

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «ДОКТОР МЕБЕЛЬ»



Якимов Ю.В.
2022 г.

Доверенности
от 21.12.2021
Остапенко Д.М.

СТОЙКА ДЛЯ ХИРУРГИЧЕСКОЙ И РЕАНИМАЦИОННОЙ АППАРАТУРЫ

по ТУ 32.50.30-024-32924160-2021

Руководство по эксплуатации
ДМ.32924160.024.РЭ

Дата последнего пересмотра: 20.06.2022 г.

2022 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	5
2	ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ	11
3	УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ	12
4	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СТОЙКИ.....	14
5	ПОРЯДОК УСТАНОВКИ СТОЙКИ.....	14
6	УКАЗАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ	15
7	ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЗГОТОВИТЕЛЯ.	16
	ПРИЛОЖЕНИЕ А	19
	ПРИЛОЖЕНИЕ Б.....	20
	ПРИЛОЖЕНИЕ В	21
	ПРИЛОЖЕНИЕ Г	23
	ПРИЛОЖЕНИЕ Д	24
	ПРИЛОЖЕНИЕ Е.....	26

Данное руководство по эксплуатации распространяется на медицинское изделие «Стойка для хирургической и реанимационной аппаратуры по ТУ 32.50.30-024-32924160-2021» (далее – стойка), предназначенное для размещения хирургической, анестезиологической, реанимационной и иной аппаратуры медицинского назначения в специализированных медицинских помещениях с классом чистоты А и Б по СП 2.1.3678-20 (включая операционную, малую операционную и реанимационную) в лечебно-профилактических учреждениях, медицинских центрах и больницах.

Область применения: Использование в специализированных медицинских помещениях с классом чистоты А и Б по СП 2.1.3678-20 в лечебно-профилактических учреждениях, медицинских центрах и больницах.

Стойка предназначена для использования квалифицированным медицинским персоналом.

Допускается использование стойки для размещения диагностической аппаратуры.

Показания к применению стойки:

Размещение хирургической и реанимационной аппаратуры в лечебно-профилактических учреждениях, медицинских центрах и больницах.

Противопоказания к применению стойки:

Не установлены в рамках предусмотренного производителем применения.

Возможные побочные эффекты:

Не выявлены.

Риски применения стойки:

Анализ рисков применения был произведен ООО «Доктор мебель» в полном объеме и представлен в Файле менеджмента риска. Меры по снижению рисков применения стоек приведены в мерах предосторожности.

Инвазивность:

Стойка является неинвазивным медицинским изделием.

Контакт с телом человека:

Стойка не контактирует с телом человека. Медицинские работники работают в защитных перчатках.

Краткое описание стойки:

Стойка представляет собой жесткую каркасную конструкцию с полками и с опорами колесными, оборудованными тормозами. Основа стойки может изготавливаться в четырех вариантах:

- ДМ-4-110-03;

- ДМ-4-110-04;
- ДМ-4-110-07;
- ДМ-4-110-12.

Окончательное наполнение и конструктивное исполнение стойки определяет заказчик из ассортимента в соответствии с Приложениями Г и Д.

Стойка предполагает регулярную обработку специальными антисептическими средствами, воздействие химических реактивов и предназначена для эксплуатации в помещениях с повышенной дезинфекционной обработкой.

Вид климатического исполнения: УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150.

По воспринимаемым механическим воздействиям относится к группе 3 по ГОСТ Р 50444.

Класс в зависимости от потенциального риска применения – 1 по ГОСТ 31508 и Приказу Минздрава РФ от 6 июня 2012 г. № 4н.

Перечень документов, на которые даны ссылки в руководстве по эксплуатации, приведен в Приложении А.

Внешний вид вариантов основы стойки приведен в Приложении Б.

Используемые при изготовлении стоек материалы и их обозначения для формирования артикула конкретизированного заказа приведены в Приложении В.

Принцип формирования артикулов для конкретизированного заказа стойки приведен в Приложении Г.

Список вариантов исполнения стойки приведен в Приложении Д.

Символы, применяемые в маркировке, приведены в Приложении Е.

1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.1 Основные параметры и характеристики

1.1.1 Внешний вид стойки приведен в Приложении Б.

1.1.2 Функциональные размеры стойки:

Стойка на основе ДМ-4-110-03:

Размер верхней плоскости короба для ящика выдвижного, измеренный внутри рамки, образуемой каркасом, должен составлять по ширине и глубине 550 мм x 550 мм – 1 шт.

Размер полки должен составлять по ширине и глубине 550 мм x 500 мм – 1 шт.

Размер полки должен составлять по ширине и глубине 550 мм x 450 мм – 1 шт.

Размер полки должен составлять по ширине и глубине 550 мм x 400 мм – 1 шт.

Размер ящика выдвижного изнутри должен составлять по ширине, глубине и высоте (Ш*Г*В) 466 мм x 324 мм x 90 мм.

Стойка на основе ДМ-4-110-04:

Размер полки должен составлять по ширине и глубине 550 мм x 555 мм – 2 шт.

Размер полки должен составлять по ширине и глубине 550 мм x 500 мм – 1 шт.

Размер полки должен составлять по ширине и глубине 550 мм x 450 мм – 1 шт.

Размер полки должен составлять по ширине и глубине 550 мм x 400 мм – 1 шт.

Стойка на основе ДМ-4-110-07:

Размер полки должен составлять по ширине и глубине 470 мм x 470 мм – 1 шт.

Размер верхней плоскости короба ящика измеренный внутри рамки, образуемой каркасом, должен составлять по ширине и глубине 385 мм x 295 мм – 1 шт.

Размер ящика выдвижного изнутри должен составлять Ш*Г*В 388 мм x 256 мм x 65 мм.

Стойка на основе ДМ-4-110-12:

Размер полки должен составлять по ширине и глубине 550 мм x 555 мм – 1 шт.

Размер полки должен составлять по ширине и глубине 550 мм x 500 мм – 1 шт.

Размер полки должен составлять по ширине и глубине 550 мм x 450 мм – 1 шт.

Допустимое отклонение от линейных размеров ± 4 мм.

1.1.3 Габаритные размеры и масса приведены в таблице 1.

Таблица 1

Основа	Габаритные размеры стойки, мм, (Ш*Г*В), ± 4 мм	Масса стойки, кг, $\pm 10\%$
ДМ-4-110-03	600 x 560 x 1330	36
ДМ-4-110-04	600 x 560 x 1340	30
ДМ-4-110-07	520 x 570 x 900	22,5

ДМ-4-110-12	600 x 560 x 840	21
-------------	-----------------	----

1.1.4 Полки и дно ящика выдвижного выдерживают предельную рабочую равномерно распределенную нагрузку - $(15,0 \pm 1,0)$ кг.:

1.1.5 Совокупная предельная рабочая нагрузка на стойку с учетом предельной равномерно распределенной нагрузки на каждую полку и на дно ящика выдвижного:

Для стойки на основе ДМ-4-110-03:	не более 60 кг;
Для стойки на основе ДМ-4-110-04:	не более 75 кг;
Для стойки на основе ДМ-4-110-07 и ДМ-4-110-12:	не более 45 кг.

1.1.6 Стойка установлена на опоры колесные, обеспечивающие устойчивость на твердой поверхности. Стойка на опорах колесных соответствует следующим требованиям:

1.1.6.1 Установленные опоры колесные снабжены тормозами, при включении которых не должно происходить непредусмотренного перемещения стойки в положении эксплуатации по поверхности с углом наклона 5° относительно горизонтальной плоскости. Тормозами оборудованы две колесные опоры из четырех.

1.1.6.2 Усилие перемещения стойки на опорах колесных с отключенными тормозами без нагрузки по твердой плоской поверхности составляет не более 50 Н (5,1 кгс).

1.1.6.3 Усилие перемещения стойки на опорах колесных с отключенными тормозами по твердой плоской поверхности с совокупной предельной рабочей нагрузкой составляет:

Для стойки на основе ДМ-4-110-03:	не более 131 Н (13,4 кгс);
Для стойки на основе ДМ-4-110-04:	не более 140 Н (14,3 кгс);
Для стойки на основе ДМ-4-110-07:	не более 88 Н (9,0 кгс);
Для стойки на основе ДМ-4-110-12:	не более 87 Н (8,9 кгс).

1.1.7 Зазор между поверхностью пола и одной из опор колесных составляет не более 3 мм. Зазоры в проемах между фасадом ящика выдвижного и проемом корпуса ящика выдвижного не превышают 3 мм.

1.1.8 Стойка на основе ДМ-4-110-03 и ДМ-4-110-07 укомплектована ящиком выдвижным, соответствующим следующим требованиям:

1.1.8.1 Ящик выдвижной выдвигается по направляющим частичного выдвижения с доводчиком и содержит механизм фиксации, предотвращающий его выпадение из корпуса при выдвижении.

1.1.8.2 Усилие выдвигания ящика выдвижного без нагрузки составляет не более 15 Н. При блокировании опор колесных стойка не должна перемещаться при выдвигании и задвигании ящика выдвижного.

1.1.9 Лакокрасочные покрытия стойки выполнены по ГОСТ 9.104 для группы условий эксплуатации 4. Наружные поверхности имеют покрытия не ниже IV класса, внутренние – не ниже VI по ГОСТ 9.032.

Покрытие стойко к истиранию и к воздействию ударов.

Цвет лакокрасочных покрытий стоек, изготовленных по одному заказу, должен быть одного цветового ряда. Цвет каркаса доступен к выбору из списка в соответствии с Приложением Г.

1.1.10 Прочность клеевого соединения облицовочного материала ПВХ толщиной 2 мм с кромкой полки из плиты ЛДСП толщиной 16 мм по ГОСТ 32289 составляет не менее 6,0 кН/м (кгс/см).

1.1.11 Металлические и неметаллические неорганические покрытия стойки соответствуют требованиям ГОСТ 9.303 для группы условий эксплуатации 1.

1.1.12 Наружные поверхности стойки и внутренние поверхности ящика выдвижного устойчивы к многократной дезинфекции по МУ 287-113 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5% раствора моющего средства по ГОСТ 25644 или 1% раствора монохлорамина по ГОСТ 14193.

1.2 Требования к сырью, материалам и покупным изделиям

1.2.1 Стойка укомплектована покупными опорами колёсными, изготовленными из стали с гальваническим покрытием, полиамида, полипропилена. Опоры колесные должны быть с одним колесом. Колесо изготовлено из термопластичной резины. Диаметр опор колесных составляет 75 мм с допустимым отклонением от указанных значений $\pm 5\%$.

1.2.2 Стойка в соответствии с вариантом исполнения изготовлена из материалов в соответствии с Приложением В. Материалы стойки имеют обозначения, отображаемые в артикуле стойки в соответствии с Приложением Г.

1.3 Комплектность

1.3.1 В комплект поставки стойки входит:

- Стойка одного варианта исполнения в соответствии с Приложением Г 1 шт.;
- Руководство по эксплуатации ДМ.32924160.024.РЭ 1 шт.

1.3.2 При заказе стойки в заявке необходимо в табличном виде указывать признаки исполнения в соответствии с артикулом варианта исполнения.

Артикул должен быть сформирован в соответствии с Приложением Г.

1.3.3 Стойка поставляется в собранном виде.

1.4 Маркировка

1.4.1 Маркировка стойки выполнена по ТУ 32.50.30-024-32924160-2021.

1.4.2 На каждой стойке прикреплена бумажная этикетка, на которой указано:

- наименование и/или товарный знак предприятия-изготовителя;
- адрес изготовителя;
- контактные данные изготовителя;
- наименование стойки;
- наименование варианта исполнения и/или артикул данного варианта исполнения;
- код партии (идентификационный номер);
- дата изготовления и упаковывания;
- гарантийный срок;
- срок службы;
- обозначение настоящих технических условий;
- знак соответствия добровольной сертификации (при наличии);
- штамп ОТК.
- номер и дата регистрационного удостоверения;

1.4.3 На транспортную и/или потребительскую упаковку наклеен бумажный ярлык, содержащий:

- наименование и/или товарный знак предприятия-изготовителя;
- адрес предприятия-изготовителя;
- адрес места производства;
- обозначение настоящих технических условий;
- номер и дата регистрационного удостоверения;
- № заказа;
- число мест;
- № места;
- штрих-код;
- штамп ОТК;
- наименование и адрес грузополучателя;
- наименование стойки;
- наименование варианта исполнения или артикул данного варианта исполнения;
- условия хранения и транспортирования.

На транспортную упаковку должны быть нанесены манипуляционные знаки по ГОСТ 14192 «Осторожно, хрупкое», «Верх», «Беречь от влаги». Манипуляционные знаки должны наноситься по трафарету или штемпелеванием черной водостойкой краской.

1.5 Упаковка

1.5.1 Перед упаковкой металлические части стойки подвергаются обезжириванию и консервации по группе II-1 ГОСТ 9.014 для условий хранения 2 по ГОСТ 15150.

1.5.2 Потребительская упаковка представляет собой ящик из гофрированного картона, оклеенный клейкой лентой. Фасадная часть стойки укрывается воздушно-пузырчатой плёнкой из полиэтилена, стойка оборачивается стрейтч-плёнкой из полиэтилена, на углах устанавливаются уголки из полиуретана либо трубка из пенополиэтилена, затем стойка упаковывается в картонный ящик. Изнутри ящик выложен упаковочной бумагой или гофрированным картоном для предотвращения самопроизвольного перемещения стойки внутри упаковки при транспортировании.

1.5.3 Не установленные на стойку детали (механизмы, крепеж и пр.), а также эксплуатационная и товаросопроводительная документация упакованы в полиэтиленовый пакет, а затем помещены в потребительскую упаковку вместе со стойкой.

1.5.4 Для транспортирования стойки в потребительских упаковках помещают в деревянный ящик, перед упаковкой в транспортный ящик потребительская упаковка со стойкой прокладывается поролоном. Для фиксации на углах транспортной упаковки устанавливаются уголки.

1.5.5 Стойка может транспортироваться в контейнерах в упаковке ВУ-1 по ГОСТ 9.014.

1.5.6 В транспортную упаковку вложен упаковочный лист, на котором указано:

- наименование предприятия-изготовителя;
- наименование стойки и вариант исполнения;
- количество мест;
- условные номера упаковщика и контролера;
- дата упаковывания.

2 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

2.1 Транспортирование стойки должно производиться в крытых транспортных средствах любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

2.1.1 Размещение и крепление транспортных упаковок со стойками в транспортных средствах должно обеспечивать их устойчивое положение, исключая возможность их смещения, ударов друг о друга и о стенки транспортных средств.

2.1.2 Транспортирование стойки крытыми транспортными средствами должно осуществляться при следующих климатических условиях:

Температура от минус 50 до плюс 50°C;

Относительная влажность до 100% при температуре плюс 25°C.

2.2 Стойка должна храниться в отапливаемых и вентилируемых помещениях с кондиционированием воздуха, расположенных в любых макроклиматических районах, в упакованном виде в вертикальном положении.

2.2.1 Хранение стойки должно осуществляться при следующих климатических условиях:

Температура от плюс 5 до плюс 40°C;

Относительная влажность до 80% при температуре 25°C.

2.2.2 Хранение стойки в одном помещении с веществами, вызывающими разрушение защитно-декоративных покрытий, не допускается.

3 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

3.1 Стойка предназначена для эксплуатации внутри помещений в условиях специализированных медицинских помещений с классом чистоты А и Б по СП 2.1.3678-20 (включая операционную, малую операционную и реанимационную) в лечебно-профилактических учреждениях, медицинских центрах и больницах.

3.2 Эксплуатация стойки должна осуществляться при следующих климатических условиях:

Температура от плюс 10 до плюс 35°C;

Относительная влажность до 80% при температуре плюс 25°C.

3.3 Меры предосторожности при применении стойки

- Стойка предназначена для применения в специализированных медицинских помещениях с классом чистоты А и Б по СП 2.1.3678-20.

- При обращении со стойкой необходимо пользоваться защитными медицинскими перчатками.

- Стойка должна быть использована только по прямому назначению.

- Стойка должна быть установлена на ровной горизонтальной поверхности.

- Предельная максимальная равномерная нагрузка на горизонтальные поверхности стойки не должна превышать 15 кг для каждой из поверхностей.

- Предельная максимальная равномерная нагрузка на стойку не должна превышать:

Для стойки на основе ДМ-4-110-03:	не более 60 кг;
-----------------------------------	-----------------

Для стойки на основе ДМ-4-110-04:	не более 75 кг;
-----------------------------------	-----------------

Для стойки на основе ДМ-4-110-07 и ДМ-4-110-12:	не более 45 кг.
---	-----------------

- Запрещается неравномерное нагружение полок и ящика выдвижного.

- Запрещается вставать и/или садиться на стойку.

- Запрещается использовать стойку, если имеются механические повреждения таких частей стойки, как колесные опоры, направляющие ящика выдвижного с доводчиком, механизмы фиксации ящика выдвижного.

- При задвигании ящика выдвижного необходимо соблюдать осторожность во избежание защемления рук ящиком.

3.4 Меры предосторожности при обнаружении неисправностей

При обнаружении в ходе назначенного применения неисправностей (например, при возникновении скрипа опор колесных, направляющих ящика выдвижного, при возникновении потрескивания полок) и/или механических повреждений частей стойки, способных снизить устойчивость стойки к нагружению, способных вызвать нарушение

устойчивости стойки, падение или опрокидывание, необходимо освободить стойку от нагрузки и обратиться к предприятию-изготовителю.

При возникновении вопросов, связанных с безопасным применением стойки, необходимо обращаться к предприятию-изготовителю.

4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СТОЙКИ

4.1.1 Очистка стойки

Перед применением стойки ее поверхности должны быть подвергнуты предварительной дезинфекции.

Уход за стойкой заключается в ежедневной влажной уборке с использованием мягких салфеток или ткани и неагрессивных, не содержащих твердых абразивных веществ, моющих средств.

При ежедневной влажной уборке рекомендуется использовать 0,5% раствор моющего средства по ГОСТ 25644 или 1% раствор монохлорамина по ГОСТ 14193.

ВНИМАНИЕ! Запрещается использовать чистящие средства, которые содержат абразивы, хлор, кислоты и соду.

После окончания уборки стойку следует насухо протереть.

ВНИМАНИЕ! Во избежание образования плесени на поверхностях стойки после каждой обработки стойка должна быть насухо протерта.

4.1.2 Дезинфекция стойки

Дезинфекцию наружных поверхностей стойки и внутренних поверхностей ящика выдвижного проводят путем однократного протирания поверхностей 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5% раствора моющего средства по ГОСТ 25644 или 1% раствором монохлорамина по ГОСТ 14193.

Дезинфекцию стойки следует проводить перед применением, а также в случае загрязнения поверхностей стойки биологическими жидкостями и потенциально загрязненными веществами.

Стойка является нестерильной и не предназначена для стерилизации.

5 ПОРЯДОК УСТАНОВКИ СТОЙКИ

Стойка по желанию заказчика может поставляться в собранном и разобранном виде.

ВНИМАНИЕ: Сборка стойки осуществляется только представителями предприятия-изготовителя.

6 УКАЗАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

6.1 Стойка подлежит утилизации в соответствии с действующими на момент утилизации правилами и требованиями, включая требования местных организаций и правила утилизации в данном регионе.

6.2 Стойка, не имевшая контакта с биологическими жидкостями, относится к эпидемиологически безопасным медицинским отходам и должна утилизироваться совместно с крупными бытовыми отходами.

6.3 Стойка, имевшая контакт с биологическими жидкостями, относится к эпидемиологически опасным медицинским отходам класса Б и перед утилизацией должна быть подвергнута обеззараживанию по СанПиН 2.1.3684-21. После соответствующего обеззараживания стойка может быть утилизирована совместно с крупными бытовыми отходами.

6.4 Стойка подлежит уничтожению в соответствии с действующими на момент утилизации правилами и требованиями, включая требования местных организаций и правила утилизации в данном регионе.

7 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

7.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие стойки требованиям ТУ 32.50.30-024-32924160-2021 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения и соблюдении мер предосторожности.

7.2 При нарушении мер предосторожности, условий эксплуатации, транспортирования и хранения потребитель лишается прав на гарантийное обслуживание.

7.3 Гарантийный срок эксплуатации стойки составляет 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

7.4 Гарантийный срок хранения стойки составляет 5 лет.

7.5 Средний срок службы стойки до списания составляет не менее 8 лет с учётом срока службы покупных изделий и компонентов со сроком службы меньшим, чем срок службы стойки.

8 СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Юридический адрес:

Общество с ограниченной ответственностью «Доктор Мебель» (ООО «Доктор Мебель»), 108811, г. Москва, километр Киевское шоссе 22-й (п. Московский), домовладение 4, строение 4, офис 511/1Д.

Контактные данные:

Телефоны:

+7 (495) 134-00-22

Сайт:

www.doctormebel.ru

Электронная почта:

info@doctormebel.ru

Адрес производства:

216400, Смоленская обл., г. Десногорск, территория Коммунально-складская зона, строение № 82.

9 РЕКЛАМАЦИИ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

Рекламации касающиеся качества медицинского изделия отправлять по адресу:

info@doctormebel.ru

10 СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Сервисное обслуживание и ремонт медицинского изделия осуществляется по адресу:

Общество с ограниченной ответственностью «Доктор Мебель» (ООО «Доктор Мебель»)

108811, г. Москва, километр Киевское шоссе 22-й (п. Московский), домовладение 4, строение 4, офис 511/1Д.

Контактные данные:

Телефоны:

+7 (495) 134-00-22

Сайт:

www.doctormebel.ru

Электронная почта:

info@doctormebel.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ А

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НА КОТОРЫЕ ДАНЫ ССЫЛКИ
В РУКОВОДСТВЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


Обозначение	Наименование
ГОСТ 9.014-78	Единая система защиты от коррозии и старения. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования
ГОСТ 9.032-74	Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения
ГОСТ 9.104-2018	Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Группы условий эксплуатации
ГОСТ 9.303-84	Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования к выбору
ГОСТ 177-88	Водорода перекись. Технические условия
ГОСТ 13663-86	Трубы стальные профильные. Технические требования
ГОСТ 14192-96	Маркировка грузов
ГОСТ 14193-78	Монохлорамин ХБ технический. Технические условия
ГОСТ 14332-78	Поливинилхлорид суспензионный. Технические условия
ГОСТ 14918-2020	Прокат листовой горячеоцинкованный. Технические условия
ГОСТ 15150-69	Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды
ГОСТ 22233-2018	Профили прессованные из алюминиевых сплавов для ограждающих конструкций. Технические условия
ГОСТ 24297-2013	Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля
ГОСТ 25644-96	Средства моющие синтетические порошкообразные. Общие технические условия
ГОСТ 31508-2012	Изделия медицинские. Классификация в зависимости от потенциального риска применения. Общие требования
ГОСТ 32289-2013	Плиты древесно-стружечные, облицованные пленками на основе термореактивных полимеров. Технические условия
ГОСТ Р 50444-2020	Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования
МУ-287-113 от 30 декабря 1998 года	Методические указания по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения
СанПиН 2.1.3684-21	Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
СП 2.1.3678-20	Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг
Приказ Минздрава России от 06.06.2012 N 4н	Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(СПРАВОЧНОЕ)
ВНЕШНИЙ ВИД СТОЙКИ

Рисунки определяют внешний вид стойки, конструктивные особенности заданы отдельно.

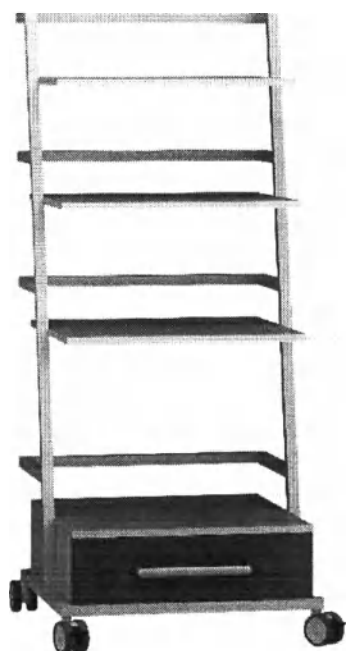


Стойка на основе ДМ-4-110-03

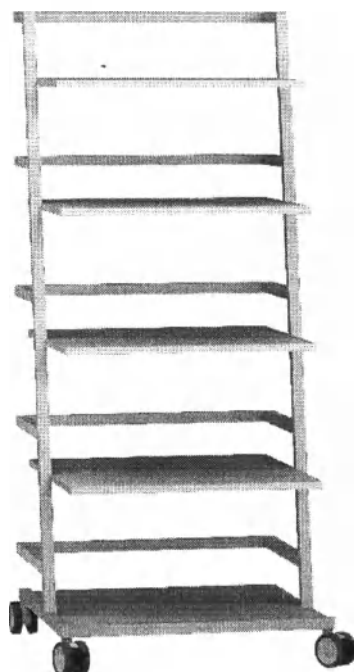

Стойка на основе ДМ-4-110-04



Стойка на основе ДМ-4-110-12

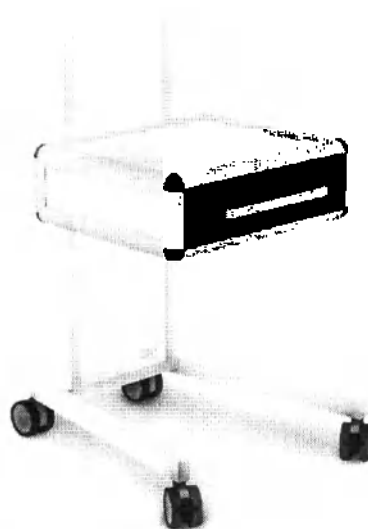

Стойка на основе ДМ-4-110-07

ПРИЛОЖЕНИЕ В
(ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ)

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ СТОЕК МАТЕРИАЛЫ И ИХ КРАТКИЕ
ОБОЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ АРТИКУЛА

Таблица В.1 – Таблица идентификации сокращений обозначений материалов стойки (за исключением полок) для формирования артикула

Материалы стойки	Номер обозначения для формирования артикула, ХХ
Каркас: Металлический профиль марки сталь 3 по ГОСТ 13663 профильным сечением 40х25 и 25х25, покрыт порошковой эпоксидно-полиэфирной краской по ТУ 2329-001-26348249-2015 или ТУ 20.30.22-001-03811176-2017 Корпус ящика выдвижного, ящик выдвижной и фасад ящика выдвижного: Гнутый оцинкованный лист толщиной 0,8 – 1,5 мм марки 08кп/пс по ГОСТ 14918, покрыт порошковой эпоксидно-полиэфирной краской по ТУ 2329-001-26348249-2015 или ТУ 20.30.22-001-03811176-2017 Фасад ящика выдвижного: Гнутый оцинкованный лист толщиной 0,8 – 1,5 мм марки 08кп/пс по ГОСТ 14918, покрыт порошковой эпоксидно-полиэфирной краской по ТУ 2329-001-26348249-2015 или ТУ 20.30.22-001-03811176-2017 с шумопоглощающим материалом - базальтовыми матами по ТУ 5769-007-13062592-2002, с ручкой из алюминия	03
Каркас: Металлический профиль стали марки сталь 3 по ГОСТ 13663 профильным сечением 40х25 и 25х25, покрыт порошковой эпоксидно-полиэфирной краской по ТУ 2329-001-26348249-2015 или ТУ 20.30.22-001-03811176-2017	04
Каркас: Металлический профиль стали марки сталь 3 по ГОСТ 13663 профильным сечением 40х25 и 25х25, покрыт порошковой эпоксидно-полиэфирной краской по ТУ 2329-001-26348249-2015 или ТУ 20.30.22-001-03811176-2017	12

Материалы стойки	Номер обозначения для формирования артикула, ХХ
Каркас: Металлический профиль марки сталь 3 по ГОСТ 13663 профильным сечением 40х25 и 25х25, покрыт порошковой эпоксидно-полиэфирной краской по ТУ 2329-001-26348249-2015 или ТУ 20.30.22-001-03811176-2017 Корпус ящика выдвижного: Профиль, прессованный из алюминиевых сплавов 6060 с анодно-окисным покрытием по ГОСТ 22233 с наполнением из ЛДСП 16 мм по ГОСТ 32289 класс эмиссии формальдегида Е1 Ящик выдвижной: Плита ЛДСП 16мм по ГОСТ 32289, с облицовкой по периметру кромкой ПВХ по ГОСТ 14332 Фасад ящика выдвижного: Плита ЛДСП 16мм по ГОСТ 32289, с облицовкой по периметру кромкой ПВХ по ГОСТ 14332, с ручкой из алюминия Полка: Плита ЛДСП 16мм по ГОСТ 32289, с облицовкой по периметру кромкой ПВХ по ГОСТ 14332	07

Таблица В.2 – Таблица идентификации сокращений обозначений материалов полки для формирования артикула

Материалы полки	Номер обозначения для формирования артикула, х
Оцинкованный лист толщиной 0,8 мм марки 08кп/пс по ГОСТ 14918 с покрытием порошковой эпоксидно-полиэфирной краской по ТУ 2329-001-26348249-2015 или ТУ 20.30.22-001-03811176-2017	1
Декоративный бумажно-слоистый пластик (HPL - HighPressureLaminate) толщиной 16 мм по ТУ 2256-001-68946326-2012 или ТУ-2256-006-11111530-2003	2
Плита ЛДСП толщиной 16 мм по ГОСТ 32289 (плиты древесно-стружечные ламинированные, облицованные пленками на основе термоактивных полимеров, тип P5, класс эмиссии формальдегида Е1) с облицовкой по периметру кромкой ПВХ по ГОСТ 14332.	4
Плита МДФ толщиной 16 мм по ТУ 5536-003-50113531-2005 облицованная с двух сторон декоративно-бумажным слоистым пластиком толщиной 0,5мм (HPL по ТУ 2256-001-68946326-2012) с облицовкой по периметру кромкой ПВХ толщиной 2 мм по ГОСТ 14332.	3

ПРИЛОЖЕНИЕ Г
(ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ)

ПРИНЦИП ФОРМИРОВАНИЯ АРТИКУЛА ДЛЯ КОНКРЕТИЗИРОВАННОГО ЗАКАЗА

Артикул варианта исполнения стойки формируется в виде

ДМ-4-110-ХХ.Ах,

где признаки исполнения выражены следующими буквами признака:

ХХ – признак основы и признак материалов, из которых изготовлена стойка.

Номер обозначения материалов стойки в соответствии с Приложением Г Таблицей Г.1;

Ах – признак материалов, из которых изготовлены полки.

Номер обозначения материалов полки в соответствии с Приложением Г Таблицей Г.2;

При отсутствии возможности реализации какого-либо признака в артикул буква признака не добавляется.

Возможные цвета каркаса и фасада ящика выдвижного

Признак	Значение признака
Цвет каркаса	
	Серый
Цвет фасада ящика выдвижного	Белый
	Синий

ПРИЛОЖЕНИЕ Д
(ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ)

ПЕРЕЧЕНЬ ВАРИАНТОВ ИСПОЛНЕНИЯ

№ п.п.	Вариант исполнения	Обозначение КД
1.	Стойка для хирургической и реанимационной аппаратуры по ТУ 32.50.30-024-32924160-2021 ДМ-4-110-03.А1	ДМ-4.СТК.32924160.024.1
2.	Стойка для хирургической и реанимационной аппаратуры по ТУ 32.50.30-024-32924160-2021 ДМ-4-110-03.А2	
3.	Стойка для хирургической и реанимационной аппаратуры по ТУ 32.50.30-024-32924160-2021 ДМ-4-110-03.А3	
4.	Стойка для хирургической и реанимационной аппаратуры по ТУ 32.50.30-024-32924160-2021 ДМ-4-110-03.А4	
5.	Стойка для хирургической и реанимационной аппаратуры по ТУ 32.50.30-024-32924160-2021 ДМ-4-110-04.А1	ДМ-4.СТК.32924160.024.2
6.	Стойка для хирургической и реанимационной аппаратуры по ТУ 32.50.30-024-32924160-2021 ДМ-4-110-04.А2	
7.	Стойка для хирургической и реанимационной аппаратуры по ТУ 32.50.30-024-32924160-2021 ДМ-4-110-04.А3	
8.	Стойка для хирургической и реанимационной аппаратуры по ТУ 32.50.30-024-32924160-2021 ДМ-4-110-04.А4	
9.	Стойка для хирургической и реанимационной аппаратуры по ТУ 32.50.30-024-32924160-2021 ДМ-4-110-12.А1	ДМ-4.СТК.32924160.024.3
10.	Стойка для хирургической и реанимационной аппаратуры по ТУ 32.50.30-024-32924160-2021 ДМ-4-110-12.А2	
11.	Стойка для хирургической и реанимационной аппаратуры по ТУ 32.50.30-024-32924160-2021 ДМ-4-110-12.А3	
12.	Стойка для хирургической и реанимационной аппаратуры по ТУ 32.50.30-024-32924160-2021 ДМ-4-110-12.А4	
13.	Стойка для хирургической и реанимационной аппаратуры по ТУ 32.50.30-024-32924160-2021 ДМ-4-110-07.А1	ДМ-4.СТК.32924160.024.4
14.	Стойка для хирургической и реанимационной аппаратуры по ТУ 32.50.30-024-32924160-2021 ДМ-4-110-07.А2	
15.	Стойка для хирургической и реанимационной аппаратуры по ТУ 32.50.30-024-32924160-2021 ДМ-4-110-07.А3	

№ п.п.	Вариант исполнения	Обозначение КД
16.	Стойка для хирургической и реанимационной аппаратуры по ТУ 32.50.30-024-32924160-2021 ДМ-4-110-07.А4	

ПРИЛОЖЕНИЕ Е
(СПРАВОЧНОЕ)
СИМВОЛЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В МАРКИРОВКЕ

Символ	Обозначение
	Хрупкое. Осторожно
	Беречь от влаги
	Верх

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью

126/96447 шест листа(ов)

Генеральный директор

ООО «Доктор Мебель»

Якимов Ю.В.



По доверенности

от 21.12.2021

Остапенко Д.М.