

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

МАСКА МЕДИЦИНСКАЯ ОДНОРАЗОВАЯ, ТРЕХСЛОЙНАЯ ИЗ НЕТКАНОГО МАТЕРИАЛА по ТУ 32.50.50-001-13738339-2020

Соответствует требованиям ГОСТ Р 58396-2019 «Маски медицинские. Требования и методы испытаний».

Тип I по ГОСТ Р 58396-2019.

Не стерильно.

Дата введения: 24.08.2020 г.

Назначение:

В качестве барьерного средства для ограничения передачи инфекционных агентов, в том числе при возникновении угрозы распространения инфекций, передающихся воздушно-капельным путем.

Потенциальный потребитель: сотрудники в медицинских и лечебно-профилактических учреждениях, пациенты и другие лица для снижения риска распространения инфекций, передающихся воздушно-капельным путем.

Функциональные характеристики:

Маска способствует сокращению выхода инфекционных агентов из носовой и ротовой полостей бессимптомного носителя или человека с клиническими симптомами.

Противопоказания: не выявлены в рамках установленного производителем назначения.

Побочные эффекты: возможна индивидуальная аллергическая реакция на материалы маски.

Технические характеристики:

Маска изготавливается из трех типов нетканого материала, соединенных между собой в различной последовательности в три слоя.

Маска изготавливается из следующих типов нетканых материалов:

- Трехслойный нетканый материал (спанбонд/мельтблэнд/спанбонд),
- Двухслойный нетканый материал (спанбонд/спанбонд),
- Однослойный нетканый материал (мельтблэнд).

Выпускается универсального размера 17,5 ($\pm 0,5$) см x 9,5 ($\pm 0,5$) см.

Изделие не содержит лекарственных средства, материалы животного или человеческого происхождения.

Способ применения:

1. Достаньте маску из упаковки и раскройте её.
2. Расположите одноразовую медицинскую маску вертикально перед лицом, удерживая ее за резинки.
3. Заведя резинку за уши, наденьте одноразовую медицинскую маску, чтобы нос и рот оказались закрытыми маской.
4. Слегка продавите пальцами носовой фиксатор слева и справа от носа для более удобного расположения маски на лице.
5. После использования снимите маску и утилизируйте согласно действующим предписаниям.

Меры предосторожности:

Не является защитным средством от газов (кислых, органических и неорганических), паров ртути и других сильных химических веществ. Не рекомендуется применять в непосредственной близости с открытым огнем, сильно нагретыми и раскаленными предметами. Не применять в случае индивидуальной непереносимости отдельных компонентов изделия.

Не допускается применять маску, имеющую механические повреждения, нарушение целостности изделия, в том числе поврежденные (надорванные ушные петли).

Маска предназначена для однократного применения.

Комплектность

В полиэтиленовой потребительской упаковке:

- Маски от 5 до 50 шт.
- Инструкция по применению – 1 экз.
- Вкладыш с маркировкой – 1 экз.

В картонной потребительской упаковке:

- Маски 20, 30 или 50 шт.;
- Инструкция по применению – 1 экз.
- Вкладыш с маркировкой – 1 экз.

Транспортирование и хранение:

Транспортировать в соответствии с условиями хранения 5 по ГОСТ 15150.

Хранить при температуре не выше 40 °С и влажности не более 80 %.

Порядок и условия утилизации:

Утилизация маски осуществляется на общих основаниях и в соответствии с требованиями согласно СанПиН 2.1.3684-21.

Использованная маска должна быть утилизирована как медицинские отходы класса «Б» в соответствии с классификацией по СанПиН 2.1.3684-21.

Не использованная маска со следами повреждений или с истекшим сроком годности должна быть утилизирована в упаковке как медицинские отходы класса «А» в соответствии с классификацией по СанПиН 2.1.3684-21.

Срок годности: 3 года с даты изготовления.

Производитель / Организация, принимающая претензии потребителей
ООО «ИСТ-ФАРМ»,
692525, Россия, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Волочаевская, д.120-Б.
Тел./факс: (4234) 33-81-27, 33-69-88.

Генеральный директор
ООО «ИСТ-ФАРМ»



Ю.В. Скачко

Прошито и
пронумеровано и
скреплено печатью
5 листа (ов)

Генеральный
директор
ООО «Ист-Фарм»
Скачко Ю. В.



20 г.