

90378

证明书

CERTIFICATE



中国国际贸易促进委员会暨中国国际商会
China Council for the Promotion of International Trade is China Chamber of International Commerce

01708625

中国国际贸易促进委员会



China Council for the Promotion of International Trade
China Chamber of International Commerce

证明书

CERTIFICATE



号码 No. 234403A0/032369

兹证明：在所附声明上的深圳市顺美医疗股份有限公司的印章属实。

THIS IS TO CERTIFY THAT: the seal of Shunmei Medical Co., LTD on the annexed DECLARATION is genuine.



授权签字:

Authorized
Signature:

Zhou Siyuan

日期: 2023年06月30日

(Date: Jun. 30, 2023)

证明网址 Website for verifying the certificate: <http://www.rzccpit.com/validate.html>

Shunmei[®]

Shunmei Medical Co., LTD

Address: R401 of building B, No. 8 of 1st Jinglong Road, Baolong Industrial Zone, Long Gang District, 518116 Shenzhen, Guangdong China.

Tel: +86 0752-3306949

Email: nora@shunmed.com web: www.shunmed.com

Declaration

Product: Central venous catheter kit Shunmei in variants

Document: Instructions for Use

The document will eventually be given to the Healthcare Center, LLC, which is used for registration of Central venous catheter kit Shunmei in variants in Russia finally.

We, Shunmei Medical Co., Ltd, hereby declare that the information on the cover page of the document is true.

Shunmei Medical Co., LTD

Function: General manager

Signature:

Date:



Согласовано/APPRO

Shunmei Medical Co., Ltd

Организация/Organization

R401 of building B, No.8 of 1st Jinlong Road,
Baolong Industrial Zone, Longgang District, Shenzhen
518116, Guangdong, China

Адрес/Address

General Manager

Должность/Occupation

Tu Zhenjin

Фамилия, Имя/ Surname, Name

27.06.2023

Дата ДД.ММ.ГГГГ/Date DD.MM.YYYY

Подпись/Signature



Инструкция по применению

Набор для катетеризации центральных вен Shunmei в вариантах исполнения

Instructions for Use

Central venous catheter kit Shunmei in variants

2023



Наименование медицинского изделия	Name of the medical device
Набор для катетеризации центральных вен Shunmei в вариантах исполнения: 1. Набор для катетеризации центральных вен Shunmei однопросветный в вариантах исполнения: 1.1. Набор для катетеризации центральных вен Shunmei однопросветный, диаметр 20 G (0,90 мм.) длина 5 см. в составе: — Катетер центральный венозный однопросветный, диаметр 20 G (0,90 мм.) длина 5 см. - 1 шт.; — Направитель проволоочный 0,018 дюйма (0,46 мм.) x 45 см. - 1 шт.; — Игла интродьюсерная 20Ga - 1 шт.; — Расширитель 4F x 6 см. - 1 шт.; — Скальпель - 1 шт.; — Шприц 5 мл. - 1 шт.; — Колпачок инъекционный - 1 шт.; — Фиксатор катетера 20G - 1 шт.; — Инструкция по применению- 1 шт. 1.2. Набор для катетеризации центральных вен Shunmei однопросветный, диаметр 20 G (0,90 мм.) длина 8 см. в составе: — Катетер центральный венозный однопросветный, диаметр 20 G (0,90 мм.) длина 8 см. - 1 шт.; — Направитель проволоочный 0,018 дюйма (0,46 мм.) x 45 см. - 1 шт.; — Игла интродьюсерная 20Ga - 1 шт.; — Расширитель 4F x 6 см. - 1 шт.; — Скальпель - 1 шт.; — Шприц 5 мл. - 1 шт.; — Колпачок инъекционный - 1 шт.; — Фиксатор катетера 20G - 1 шт.; — Инструкция по применению- 1 шт. 1.3. Набор для катетеризации центральных вен Shunmei однопросветный, диаметр 20 G (0,90 мм.) длина 13 см. в составе:	Central venous catheter kit Shunmei in variants: 1. Central venous catheter kit Shunmei Single lumen in variants: 1.1. Central venous catheter kit Shunmei Single lumen, diameter 20 G (0,9 mm.) length 5 cm. consists of: — Central venous catheter Single lumen, diameter 20 G (0,9 mm.) length 5 cm. - 1 pc.; — Guide wire 0,018 inch (0,46 mm.) x 45 cm. - 1 pc.; — Introducer needle 20Ga - 1 pc.; — Dilator 4F x 6 cm. - 1 pc.; — Scalpel- 1 pc.; — Syringe 5 ml. - 1 pc.; — Injection cap - 1 pc.; — Catheter clamp 20G - 1 pc.; — Instructions for use - 1 pc. 1.2. Central venous catheter kit Shunmei Single lumen, diameter 20 G (0,9 mm.) length 8 cm. consists of: — Central venous catheter Single lumen, diameter 20 G (0,9 mm.) length 8 cm. - 1 pc.; — Guide wire 0,018 inch (0,46 mm.) x 45 cm. - 1 pc.; — Introducer needle 20Ga - 1 pc.; — Dilator 4F x 6 cm. - 1 pc.; — Scalpel- 1 pc.; — Syringe 5 ml. - 1 pc.; — Injection cap - 1 pc.; — Catheter clamp 20G - 1 pc.; — Instructions for use - 1 pc. 1.3. Central venous catheter kit Shunmei Single lumen, diameter 20 G (0,9 mm.) length 13 cm. consists of: — Central venous catheter Single lumen, diameter 20 G (0,9

- Катетер центральный венозный однопросветный, диаметр 20 G (0,90 мм) длина 13 см. - 1 шт.;
- Направитель проволоочный 0,018 дюйма (0,46 мм.) x 45 см. - 1 шт.;
- Игла интродьюсерная 20Ga - 1 шт.;
- Расширитель 4F x 6 см. - 1 шт.;
- Скальпель - 1 шт.;
- Шприц 5 мл. - 1 шт.;
- Колпачок инъекционный - 1 шт.;
- Фиксатор катетера 20G - 1 шт.;
- Инструкция по применению- 1 шт.
- 1.4. Набор для катетеризации центральных вен Shunmei однопросветный, диаметр 20 G (0,90 мм.) длина 15 см. в составе:
 - Катетер центральный венозный однопросветный, диаметр 20 G (0,90 мм) длина 15 см. - 1 шт.;
 - Направитель проволоочный 0,018 дюйма (0,46 мм.) x 45 см. - 1 шт.;
 - Игла интродьюсерная 20Ga - 1 шт.;
 - Расширитель 4F x 6 см. - 1 шт.;
 - Скальпель - 1 шт.;
 - Шприц 5 мл. - 1 шт.;
 - Колпачок инъекционный - 1 шт.;
 - Фиксатор катетера 20G - 1 шт.;
 - Инструкция по применению- 1 шт.
- 1.5. Набор для катетеризации центральных вен Shunmei однопросветный, диаметр 20 G (0,90 мм.) длина 16 см. в составе:
 - Катетер центральный венозный однопросветный, диаметр 20 G (0,90 мм) длина 16 см. - 1 шт.;
 - Направитель проволоочный 0,018 дюйма (0,46 мм.) x 45 см. - 1 шт.;
 - Игла интродьюсерная 20Ga - 1 шт.;
 - Расширитель 4F x 6 см. - 1 шт.;
 - Скальпель - 1 шт.;

- mm) length 13 cm. - 1 pc.;
- Guide wire 0,018 inch (0,46 mm.) x 45 cm. - 1 pc.;
- Introducer needle 20Ga - 1 pc.;
- Dilator 4F x 6 cm. - 1 pc.;
- Scalpel- 1 pc.;
- Syringe 5 ml. - 1 pc.;
- Injection cap - 1 pc.;
- Catheter clamp 20G - 1 pc.;
- Instructions for use - 1 pc.
- 1.4. Central venous catheter kit Shunmei Single lumen, diameter 20 G (0,9 mm.) length 15 cm. consists of:
 - Central venous catheter Single lumen, diameter 20 G (0,9 mm) length 15 cm. - 1 pc.;
 - Guide wire 0,018 inch (0,46 mm.) x 45 cm. - 1 pc.;
 - Introducer needle 20Ga - 1 pc.;
 - Dilator 4F x 6 cm. - 1 pc.;
 - Scalpel- 1 pc.;
 - Syringe 5ml. - 1 pc.;
 - Injection cap - 1 pc.;
 - Catheter clamp 20G - 1 pc.;
 - Instructions for use - 1 pc.
- 1.5. Central venous catheter kit Shunmei Single lumen, diameter 20 G (0,9 mm.) length 16 cm. consists of:
 - Central venous catheter Single lumen, diameter 20 G (0,9 mm) length 16 cm. - 1 pc.;
 - Guide wire 0,018 inch (0,46 mm.) x 45 cm. - 1 pc.;
 - Introducer needle 20Ga - 1 pc.;
 - Dilator 4F x 6 cm. - 1 pc.;
 - Scalpel- 1 pc.;
 - Syringe 5 ml. - 1 pc.;
 - Injection cap - 1 pc.;

- Шприц 5 мл. - 1 шт.;
- Колпачок инъекционный - 1 шт.;
- Фиксатор катетера 20G - 1 шт.;
- Инструкция по применению- 1 шт.
- 1.6. Набор для катетеризации центральных вен Shunmei
однопросветный, диаметр 20 G (0,90 мм.) длина 20 см. в составе:
 - Катетер центральный венозный однопросветный, диаметр 20 G (0,90 мм) длина 20 см. - 1 шт.;
 - Направитель проволоочный 0,018 дюйма (0,46 мм.) x 45 см. - 1 шт.;
 - Игла интродьюсерная 20Ga - 1 шт.;
 - Расширитель 4F x 6 см. - 1 шт.;
 - Скальпель - 1 шт.;
 - Шприц 5 мл. - 1 шт.;
 - Колпачок инъекционный - 1 шт.;
 - Фиксатор катетера 20G - 1 шт.;
 - Инструкция по применению- 1 шт.
- 1.7. Набор для катетеризации центральных вен Shunmei
однопросветный, диаметр 18 G (1,20 мм.) длина 12 см. в составе:
 - Катетер центральный венозный однопросветный, диаметр 18 G (1,20 мм) длина 12 см. - 1 шт.;
 - Направитель проволоочный 0,021 дюйма (0,53 мм.) x 45 см. - 1 шт.;
 - Игла интродьюсерная 20Ga - 1 шт.;
 - Расширитель 5F x 7 см. - 1 шт.;
 - Скальпель - 1 шт.;
 - Шприц 5 мл. - 1 шт.;
 - Колпачок инъекционный - 1 шт.;
 - Фиксатор катетера 4F - 1 шт.;
 - Инструкция по применению- 1 шт.
- 1.8. Набор для катетеризации центральных вен Shunmei
однопросветный, диаметр 18 G (1,20 мм.) длина 13 см. в составе:
 - Катетер центральный венозный однопросветный, диаметр 18 G

- Catheter clamp 20G - 1 pc.;
- Instructions for use - 1 pc.
- 1.6. Central venous catheter kit Shunmei Single lumen,
diameter 20 G (0,9 mm.) length 20 cm. consists of:
 - Central venous catheter Single lumen, diameter 20 G (0,9 mm) length 20 cm. - 1 pc.;
 - Guide wire 0,018 inch (0,46 mm.) x 45 cm. - 1 pc.;
 - Introducer needle 20Ga - 1 pc.;
 - Dilator 4F x 6 cm. - 1 pc.;
 - Scalpel- 1 pc.;
 - Syringe 5 ml. - 1 pc.;
 - Injection cap - 1 pc.;
 - Catheter clamp 20G - 1 pc.;
 - Instructions for use - 1 pc.
- 1.7. Central venous catheter kit Shunmei Single lumen,
diameter 18 G (1,2 mm.) length 12 cm. consists of: 609110
 - Central venous catheter Single lumen, diameter 18 G (1,2 mm) length 12 cm. - 1 pc.;
 - Guide wire 0,021 inch (0,53 mm.) x 45 cm. - 1 pc.;
 - Introducer needle 20Ga - 1 pc.;
 - Dilator 5F x 7 cm. - 1 pc.;
 - Scalpel- 1 pc.;
 - Syringe 5 ml. - 1 pc.;
 - Injection cap - 1 pc.;
 - Catheter clamp 4F - 1 pc.;
 - Instructions for use - 1 pc.
- 1.8. Central venous catheter kit Shunmei Single lumen,
diameter 18 G (1,2 mm.) length 13 cm. consists of:
 - Central venous catheter Single lumen, diameter 18 G (1,2 mm) length 13 cm. - 1 pc.;
 - Guide wire 0,021 inch (0,53 mm.) x 45 cm. - 1 pc.;

- (1,20 мм) длина 13 см. - 1 шт.;
- Направитель проволоочный 0,021 дюйма (0,53 мм.) x 45 см. - 1 шт.;
- Игла интродьюсерная 20Ga - 1 шт.;
- Расширитель 5F x 7 см. - 1 шт.;
- Скальпель - 1 шт.;
- Шприц 5 мл. - 1 шт.;
- Колпачок инъекционный - 1 шт.;
- Фиксатор катетера 4F - 1 шт.;
- Инструкция по применению- 1 шт.
- 1.9. Набор для катетеризации центральных вен Shunmei однопросветный, диаметр 18 G (1,20 мм.) длина 15 см. в составе:
 - Катетер центральный венозный однопросветный, диаметр 18 G (1,20 мм) длина 15 см. - 1 шт.;
 - Направитель проволоочный 0,021 дюйма (0,53 мм.) x 45 см. - 1 шт.;
 - Игла интродьюсерная 20Ga - 1 шт.;
 - Расширитель 5F x 7 см. - 1 шт.;
 - Скальпель - 1 шт.;
 - Шприц 5 мл. - 1 шт.;
 - Колпачок инъекционный - 1 шт.;
 - Фиксатор катетера 4F - 1 шт.;
 - Инструкция по применению- 1 шт.
- 1.10. Набор для катетеризации центральных вен Shunmei однопросветный, диаметр 18 G (1,20 мм.) длина 16 см. в составе:
 - Катетер центральный венозный однопросветный, диаметр 18 G (1,20 мм) длина 16 см. - 1 шт.;
 - Направитель проволоочный 0,021 дюйма (0,53 мм.) x 45 см. - 1 шт.;
 - Игла интродьюсерная 20Ga - 1 шт.;
 - Расширитель 5F x 7 см. - 1 шт.;
 - Скальпель - 1 шт.;
 - Шприц 5 мл. - 1 шт.;

- Introducer needle 20Ga - 1 pc.;
- Dilator 5F x 7 cm. - 1 pc.;
- Scalpel- 1 pc.;
- Syringe 5 ml. - 1 pc.;
- Injection cap - 1 pc.;
- Catheter clamp 4F - 1 pc.;
- Instructions for use - 1 pc.
- 1.9. Central venous catheter kit Shunmei Single lumen, diameter 18 G (1,2 mm.) length 15 cm. consists of:
 - Central venous catheter Single lumen, diameter 18 G (1,2 mm) length 15 cm. - 1 pc.;
 - Guide wire 0,021 inch (0,53 mm.) x 45 cm. - 1 pc.;
 - Introducer needle 20Ga - 1 pc.;
 - Dilator 5F x 7 cm. - 1 pc.;
 - Scalpel- 1 pc.;
 - Syringe 5 ml. - 1 pc.;
 - Injection cap - 1 pc.;
 - Catheter clamp 4F - 1 pc.;
 - Instructions for use - 1 pc.
- 1.10. Central venous catheter kit Shunmei Single lumen, diameter 18 G (1,2 mm.) length 16 cm. consists of:
 - Central venous catheter Single lumen, diameter 18 G (1,2 mm) length 16 cm. - 1 pc.;
 - Guide wire 0,021 inch (0,53 mm.) x 45 cm. - 1 pc.;
 - Introducer needle 20Ga - 1 pc.;
 - Dilator 5F x 7 cm. - 1 pc.;
 - Scalpel- 1 pc.;
 - Syringe 5 ml. - 1 pc.;
 - Injection cap - 1 pc.;
 - Catheter clamp 4F - 1 pc.;
 - Instructions for use - 1 pc.

- Колпачок инъекционный - 1 шт.;
- Фиксатор катетера 4F - 1 шт.;
- Инструкция по применению- 1 шт.
- 1.11. Набор для катетеризации центральных вен Shunmei
однопросветный, диаметр 18 G (1,20 мм.) длина 20 см. в составе:
 - Катетер центральный венозный однопросветный, диаметр 18 G (1,20 мм) длина 20 см. - 1 шт.;
 - Направитель проволоочный 0,021 дюйма (0,53 мм.) x 45 см. - 1 шт.;
 - Игла интродьюсерная 20Ga - 1 шт.;
 - Расширитель 5F x 7 см. - 1 шт.;
 - Скальпель - 1 шт.;
 - Шприц 5 мл. - 1 шт.;
 - Колпачок инъекционный - 1 шт.;
 - Фиксатор катетера 4F - 1 шт.;
 - Инструкция по применению- 1 шт.
- 1.12. Набор для катетеризации центральных вен Shunmei
однопросветный, диаметр 16 G (1,60 мм.) длина 15 см. в составе:
 - Катетер центральный венозный однопросветный, диаметр 16 G (1,60 мм) длина 15 см. - 1 шт.;
 - Направитель проволоочный 0,032 дюйма (0,81 мм.) x 60 см. - 1 шт.;
 - Игла интродьюсерная 18Ga - 1 шт.;
 - Расширитель 7F x 10 см. - 1 шт.;
 - Скальпель - 1 шт.;
 - Шприц 5 мл. - 1 шт.;
 - Колпачок инъекционный - 1 шт.;
 - Фиксатор катетера 5F - 1 шт.;
 - Инструкция по применению- 1 шт.
- 1.13. Набор для катетеризации центральных вен Shunmei
однопросветный, диаметр 16 G (1,60 мм.) длина 16 см. в составе:
 - Катетер центральный венозный однопросветный, диаметр 16 G (1,60 мм) длина 16 см. - 1 шт.;

- 1.11. Central venous catheter kit Shunmei Single lumen,
diameter 18 G (1,2 mm.) length 20 cm. consists of:
 - Central venous catheter Single lumen, diameter 18 G (1,2 mm) length 20 cm. - 1 pc.;
 - Guide wire 0,021 inch (0,53 mm.) x 45 cm. - 1 pc.;
 - Introducer needle 20Ga - 1 pc.;
 - Dilator 5F x 7 cm. - 1 pc.;
 - Scalpel- 1 pc.;
 - Syringe 5 ml. - 1 pc.;
 - Injection cap - 1 pc.;
 - Catheter clamp 4F - 1 pc.;
 - Instructions for use - 1 pc.
- 1.12. Central venous catheter kit Shunmei Single lumen,
diameter 16 (1,6 mm.) length 15 cm. consists of:
 - Central venous catheter Single lumen, diameter 16 G (1,6 mm) length 15 cm. - 1 pc.;
 - Guide wire 0,032 inch (0,81 mm.) x 60 cm. - 1 pc.;
 - Introducer needle 18Ga - 1 pc.;
 - Dilator 7F x 10 cm. - 1 pc.;
 - Scalpel- 1 pc.;
 - Syringe 5 ml. - 1 pc.;
 - Injection cap - 1 pc.;
 - Catheter clamp 5F - 1 pc.;
 - Instructions for use - 1 pc.
- 1.13. Central venous catheter kit Shunmei Single lumen,
diameter 16 G (1,6 mm.) length 16 cm. consists of:
 - Central venous catheter Single lumen, diameter 16 G (1,6 mm) length 16 cm. - 1 pc.;
 - Guide wire 0,032 inch (0,81 mm.) x 60 cm. - 1 pc.;
 - Introducer needle 18Ga - 1 pc.;
 - Dilator 7F x 10 cm. - 1 pc.;

- Направитель проволочный 0,032 дюйма (0,81 мм.) x 60 см. - 1 шт.;
 - Игла интродьюсерная 18Ga - 1 шт.;
 - Расширитель 7F x 10 см. - 1 шт.;
 - Скальпель - 1 шт.;
 - Шприц 5 мл. - 1 шт.;
 - Колпачок инъекционный - 1 шт.;
 - Фиксатор катетера 5F - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
- 1.14. Набор для катетеризации центральных вен Shunmei однопросветный, диаметр 16 G (1,60 мм.) длина 20 см. в составе:
- Катетер центральный венозный однопросветный, диаметр 16 G (1,60 мм) длина 20 см. - 1 шт.;
 - Направитель проволочный 0,032 дюйма (0,81 мм.) x 60 см. - 1 шт.;
 - Игла интродьюсерная 18Ga - 1 шт.;
 - Расширитель 7F x 10 см. - 1 шт.;
 - Скальпель - 1 шт.;
 - Шприц 5 мл. - 1 шт.;
 - Колпачок инъекционный - 1 шт.;
 - Фиксатор катетера 5F - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
- 1.15. Набор для катетеризации центральных вен Shunmei однопросветный, диаметр 16 G (1,60 мм.) длина 30 см. в составе:
- Катетер центральный венозный однопросветный, диаметр 16 G (1,60 мм) длина 30 см. - 1 шт.;
 - Направитель проволочный 0,032 дюйма (0,81 мм.) x 60 см. - 1 шт.;
 - Игла интродьюсерная 18Ga - 1 шт.;
 - Расширитель 7F x 10 см. - 1 шт.;
 - Скальпель - 1 шт.;
 - Шприц 5 мл. - 1 шт.;
 - Колпачок инъекционный - 1 шт.;

- Scalpel- 1 pc.;
 - Syringe 5 ml. - 1 pc.;
 - Injection cap - 1 pc.;
 - Catheter clamp 5F - 1 pc.;
 - Instructions for use - 1 pc.
- 1.14. Central venous catheter kit Shunmei Single lumen, diameter 16 G (1,6 mm.) length 20 cm. consists of:
- Central venous catheter Single lumen, diameter 16 G (1,6 mm) length 20 cm. - 1 pc.;
 - Guide wire 0,032 inch (0,81 mm.) x 60 cm. - 1 pc.;
 - Introducer needle 18Ga - 1 pc.;
 - Dilator 7F x 10 cm. - 1 pc.;
 - Scalpel- 1 pc.;
 - Syringe 5 ml. - 1 pc.;
 - Injection cap - 1 pc.;
 - Catheter clamp 5F - 1 pc.;
 - Instructions for use - 1 pc.
- 1.15. Central venous catheter kit Shunmei Single lumen, diameter 16 G (1,6 mm.) length 30 cm. consists of:
- Central venous catheter Single lumen, diameter 16 G (1,6 mm) length 30 cm. - 1 pc.;
 - Guide wire 0,032 inch (0,81 mm.) x 60 cm. - 1 pc.;
 - Introducer needle 18Ga - 1 pc.;
 - Dilator 7F x 10 cm. - 1 pc.;
 - Scalpel- 1 pc.;
 - Syringe 5 ml. - 1 pc.;
 - Injection cap - 1 pc.;
 - Catheter clamp 5F - 1 pc.;
 - Instructions for use - 1 pc.
- 1.16. Central venous catheter kit Shunmei Single lumen, diameter 14 G (2,1 mm.) length 15 cm. consists of:

- Фиксатор катетера 5F - 1 шт.;
- Инструкция по применению- 1 шт.
- 1.16. Набор для катетеризации центральных вен Shunmei однопросветный, диаметр 14 G (2,10 мм.) длина 15 см. в составе:
 - Катетер центральный венозный однопросветный, диаметр 14 G (2,10 мм) длина 15 см. - 1 шт.;
 - Направитель проволоочный 0,032 дюйма (0,81 мм.) x 60 см. - 1 шт.;
 - Игла интродьюсерная 18Ga - 1 шт.;
 - Расширитель 8F x 10 см. - 1 шт.;
 - Скальпель - 1 шт.;
 - Шприц 5 мл. - 1 шт.;
 - Колпачок инъекционный - 1 шт.;
 - Фиксатор катетера 7F - 1 шт.;
 - Инструкция по применению- 1 шт.
- 1.17. Набор для катетеризации центральных вен Shunmei однопросветный, диаметр 14 G (2,10 мм.) длина 16 см. в составе:
 - Катетер центральный венозный однопросветный, диаметр 14 G (2,10 мм) длина 16 см. - 1 шт.;
 - Направитель проволоочный 0,032 дюйма (0,81 мм.) x 60 см. - 1 шт.;
 - Игла интродьюсерная 18Ga - 1 шт.;
 - Расширитель 8F x 10 см. - 1 шт.;
 - Скальпель - 1 шт.;
 - Шприц 5 мл. - 1 шт.;
 - Колпачок инъекционный - 1 шт.;
 - Фиксатор катетера 7F - 1 шт.;
 - Инструкция по применению- 1 шт.
- 1.18. Набор для катетеризации центральных вен Shunmei однопросветный, диаметр 14 G (2,10 мм.) длина 20 см. в составе:
 - Катетер центральный венозный однопросветный, диаметр 14 G (2,10 мм) длина 20 см. - 1 шт.;
 - Направитель проволоочный 0,032 дюйма (0,81 мм.) x 60 см. - 1

- Central venous catheter Single lumen, diameter 14 G (2,1 mm) length 15 cm. - 1 pc.;
- Guide wire 0,032 inch (0,81 mm.) x 60 cm. - 1 pc.;
- Introducer needle 18Ga - 1 pc.;
- Dilator 8F x 10 cm. - 1 pc.;
- Scalpel- 1 pc.;
- Syringe 5 ml. - 1 pc.;
- Injection cap - 1 pc.;
- Catheter clamp 7F - 1 pc.;
- Instructions for use - 1 pc.
- 1.17. Central venous catheter kit Shunmei Single lumen, diameter 14 G (2,1 mm.) length 16 cm. consists of:
 - Central venous catheter Single lumen, diameter 14 G (2,1 mm) length 16 cm. - 1 pc.;
 - Guide wire 0,032 inch (0,81 mm.) x 60 cm. - 1 pc.;
 - Introducer needle 18Ga - 1 pc.;
 - Dilator 8F x 10 cm. - 1 pc.;
 - Scalpel- 1 pc.;
 - Syringe 5 ml. - 1 pc.;
 - Injection cap - 1 pc.;
 - Catheter clamp 7F - 1 pc.;
 - Instructions for use - 1 pc.
- 1.18. Central venous catheter kit Shunmei Single lumen, diameter 14 G (2,1 mm.) length 20 cm. consists of:
 - Central venous catheter Single lumen, diameter 14 Ga (2,1 mm) length 20 cm. - 1 pc.;
 - Guide wire 0,032 inch (0,81 mm.) x 60 cm. - 1 pc.;
 - Introducer needle 18Ga - 1 pc.;
 - Dilator 8F x 10 cm. - 1 pc.;
 - Scalpel- 1 pc.;
 - Syringe 5 ml. - 1 pc.;

шт.; — Игла интродьюсерная 18Ga - 1 шт.; — Расширитель 8F x 10 см. - 1 шт.; — Скальпель - 1 шт.; — Шприц 5 мл. - 1 шт.; — Колпачок инъекционный - 1 шт.; — Фиксатор катетера 7F - 1 шт.; — Инструкция по применению- 1 шт. 1.19. Набор для катетеризации центральных вен Shunmei однопросветный, диаметр 14 G (2,10 мм.) длина 30 см. в составе: — Катетер центральный венозный однопросветный, диаметр 14 G (2,10 мм) длина 30 см. - 1 шт.; — Направитель проволоочный 0,032 дюйма (0,81 мм.) x 60 см. - 1 шт.; — Игла интродьюсерная 18Ga - 1 шт.; — Расширитель 8F x 10 см. - 1 шт.; — Скальпель - 1 шт.; — Шприц 5 мл. - 1 шт.; — Колпачок инъекционный - 1 шт.; — Фиксатор катетера 7F - 1 шт.; — Инструкция по применению- 1 шт. 2. Набор для катетеризации центральных вен Shunmei двухпросветный в вариантах исполнения: 2.1. Набор для катетеризации центральных вен Shunmei двухпросветный, диаметр 4 Fr (1,33 мм.) длина 5 см. в составе: — Катетер центральный венозный двухпросветный, диаметр 4 Fr (1,33 мм) длина 5 см. - 1 шт.; — Направитель проволоочный 0,018 дюйма (0, 0,46 мм.) x 45 см. - 1 шт.; — Игла интродьюсерная 20Ga - 1 шт.; — Расширитель 5F x 7 см. - 1 шт.; — Скальпель - 1 шт.;	— Injection cap - 1 pc.; — Catheter clamp 7F - 1 pc.; — Instructions for use - 1 pc. 1.19. Central venous catheter kit Shunmei Single lumen, diameter 14 G (2,1 mm.) length 30 cm. consists of: — Central venous catheter Single lumen, diameter 14 G (2,1 mm) length 30 cm. - 1 pc.; — Guide wire 0,032 inch (0,81 mm.) x 60 cm. - 1 pc.; — Introducer needle 18Ga - 1 pc.; — Dilator 8F x 10 cm. - 1 pc.; — Scalpel- 1 pc.; — Syringe 5 ml. - 1 pc.; — Injection cap - 1 pc.; — Catheter clamp 7F - 1 pc.; — Instructions for use - 1 pc. 2. Central venous catheter kit Shunmei Double lumen in variants: 2.1. Central venous catheter kit Shunmei Double lumen, diameter 4 Fr (1,33 mm.) length 5 cm. consists of: — Central venous catheter Double lumen, diameter 4 Fr (1,33 mm) length 5 cm. - 1 pc.; — Guide wire 0,018inch (0,46 mm.) x 45 cm. - 1 pc.; — Introducer needle 20Ga - 1 pc.; — Dilator 5F×7cm. - 1 pc.; — Scalpel- 1 pc.; — Syringe 5 ml. - 1 pc.; — Injection cap - 2 pc.; — Catheter clamp 4F - 1 pc.; — Instructions for use - 1 pc. 2.2. Central venous catheter kit Shunmei Double lumen, diameter 4 Fr (1,33 mm.) length 8 cm. consists of:
---	---

- Шприц 5 мл. - 1 шт.;
- Колпачок инъекционный - 2 шт.;
- Фиксатор катетера 4F - 1 шт.;
- Инструкция по применению- 1 шт.
- 2.2. Набор для катетеризации центральных вен Shunmei двухпросветный, диаметр 4 Fr (1,33 мм.) длина 8 см. в составе:
 - Катетер центральный венозный двухпросветный, диаметр 4 Fr (1,33 мм) длина 8 см. - 1 шт.;
 - Направитель проволоочный 0,018 дюйма (0, 0,46 мм.) x 45 см. - 1 шт.;
 - Игла интродьюсерная 20Ga - 1 шт.;
 - Расширитель 5F x 7 см. - 1 шт.;
 - Скальпель - 1 шт.;
 - Шприц 5 мл. - 1 шт.;
 - Колпачок инъекционный - 2 шт.;
 - Фиксатор катетера 4F - 1 шт.;
 - Инструкция по применению- 1 шт.
- 2.3. Набор для катетеризации центральных вен Shunmei двухпросветный, диаметр 4 Fr (1,33 мм.) длина 13 см. в составе:
 - Катетер центральный венозный двухпросветный, диаметр 4 Fr (1,33 мм) длина 13 см. - 1 шт.;
 - Направитель проволоочный 0,018 дюйма (0, 0,46 мм.) x 45 см. - 1 шт.;
 - Игла интродьюсерная 20Ga - 1 шт.;
 - Расширитель 5F x 7 см. - 1 шт.;
 - Скальпель - 1 шт.;
 - Шприц 5 мл. - 1 шт.;
 - Колпачок инъекционный - 2 шт.;
 - Фиксатор катетера 4F - 1 шт.;
 - Инструкция по применению- 1 шт.
- 2.4. Набор для катетеризации центральных вен Shunmei двухпросветный, диаметр 5 Fr (1,67 мм.) длина 8 см. в составе:
 - Катетер центральный венозный двухпросветный, диаметр 5 Fr

- Central venous catheter Double lumen, diameter 4 Fr (1,33 mm) length 8 cm. - 1 pc.;
- Guide wire 0,018inch (0,46 mm.) x 45 cm. - 1 pc.;
- Introducer needle 20Ga - 1 pc.;
- Dilator 5F×7 cm. - 1 pc.;
- Scalpel- 1 pc.;
- Syringe 5 ml. - 1 pc.;
- Injection cap - 2 pc.;
- Catheter clamp 4F - 1 pc.;
- Instructions for use - 1 pc.
- 2.3. Central venous catheter kit Shunmei Double lumen, diameter 4 Fr (1,33 mm.) length 13 cm. consists of:
 - Central venous catheter Double lumen, diameter 4 Fr (1,33 mm) length 13 cm. - 1 pc.;
 - Guide wire 0,018 inch (0,46 mm.) x 45 cm. - 1 pc.;
 - Introducer needle 20Ga - 1 pc.;
 - Dilator 5F×7 cm. - 1 pc.;
 - Scalpel- 1 pc.;
 - Syringe 5 ml. - 1 pc.;
 - Injection cap - 2 pc.;
 - Catheter clamp 4F - 1 pc.;
 - Instructions for use - 1 pc.
- 2.4. Central venous catheter kit Shunmei Double lumen, diameter 5 Fr (1,67 mm.) length 8 cm. consists of:
 - Central venous catheter Double lumen, diameter 5 Fr (1,67 mm) length 8 cm. - 1 pc.;
 - Guide wire 0,021 inch (0,53 mm.) x 45 cm. - 1 pc.;
 - Introducer needle 20Ga - 1 pc.;
 - Dilator 6F x 8 cm. - 1 pc.;
 - Scalpel- 1 pc.;
 - Syringe 5 ml. - 1 pc.;

(1,67 мм) длина 8 см. - 1 шт.; — Направитель проволоочный 0,021 дюйма (0,53 мм.) x 45 см. - 1 шт.; — Игла интродьюсерная 20Ga - 1 шт.; — Расширитель 6F x 8 см. - 1 шт.; — Скальпель - 1 шт.; — Шприц 5 мл. - 1 шт.; — Колпачок инъекционный - 2 шт.; — Фиксатор катетера 5F - 1 шт.; — Инструкция по применению- 1 шт. 2.5. Набор для катетеризации центральных вен Shunmei двухпросветный, диаметр 5 Fr (1,67 мм.) длина 10 см. в составе: — Катетер центральный венозный двухпросветный, диаметр 5 Fr (1,67 мм) длина 10 см. - 1 шт.; — Направитель проволоочный 0,021 дюйма (0,53 мм.) x 45 см. - 1 шт.; — Игла интродьюсерная 20Ga - 1 шт.; — Расширитель 6F x 8 см. - 1 шт.; — Скальпель - 1 шт.; — Шприц 5 мл. - 1 шт.; — Колпачок инъекционный - 2 шт.; — Фиксатор катетера 5F - 1 шт.; — Инструкция по применению- 1 шт. 2.6. Набор для катетеризации центральных вен Shunmei двухпросветный, диаметр 5 Fr (1,67 мм.) длина 13 см. в составе: — Катетер центральный венозный двухпросветный, диаметр 5 Fr (1,67 мм) длина 13 см. - 1 шт.; — Направитель проволоочный 0,021 дюйма (0,53 мм.) x 45 см. - 1 шт.; — Игла интродьюсерная 20Ga - 1 шт.; — Расширитель 6F x 8 см. - 1 шт.; — Скальпель - 1 шт.; — Шприц 5 мл. - 1 шт.;	— Injection cap - 2 pc.; — Catheter clamp 5F - 1 pc.; — Instructions for use - 1 pc. 2.5. Central venous catheter kit Shunmei Double lumen, diameter 5 Fr (1,67 mm.) length 10 cm. consists of: — Central venous catheter Double lumen, diameter 5 Fr (1,67 mm) length 10 cm. - 1 pc.; — Guide wire 0,021 inch (0,53 mm.) x 45 cm. - 1 pc.; — Introducer needle 20Ga - 1 pc.; — Dilator 6F x 8 cm. - 1 pc.; — Scalpel- 1 pc.; — Syringe 5 ml. - 1 pc.; — Injection cap - 2 pc.; — Catheter clamp 5F - 1 pc.; — Instructions for use - 1 pc. 2.6. Central venous catheter kit Shunmei Double lumen, diameter 5 Fr (1,67 mm.) length 13 cm. consists of: — Central venous catheter Double lumen, diameter 5 Fr (1,67 mm) length 13 cm. - 1 pc.; — Guide wire 0,021 inch (0,53 mm.) x 45 cm. - 1 pc.; — Introducer needle 20Ga - 1 pc.; — Dilator 6F x 8 cm. - 1 pc.; — Scalpel- 1 pc.; — Syringe 5 ml. - 1 pc.; — Injection cap - 2 pc.; — Catheter clamp 5F - 1 pc.; — Instructions for use - 1 pc. 2.7. Central venous catheter kit Shunmei Double lumen, diameter 5 Fr (1,67 mm.) length 15 cm. consists of: — Central venous catheter Double lumen, diameter 5 Fr (1,67 mm) length 15 cm. - 1 pc.;
---	---

- Колпачок инъекционный - 2 шт.;
- Фиксатор катетера 5F - 1 шт.;
- Инструкция по применению- 1 шт.

2.7. Набор для катетеризации центральных вен Shunmei двухпросветный, диаметр 5 Fr (1,67 мм.) длина 15 см. составе:

- Катетер центральный венозный двухпросветный, диаметр 5 Fr (1,67 мм) длина 15 см. - 1 шт.;
- Направитель проволоочный 0,021 дюйма (0,53 мм.) x 45 см. - 1 шт.;
- Игла интродьюсерная 20Ga - 1 шт.;
- Расширитель 6F x 8 см. - 1 шт.;
- Скальпель - 1 шт.;
- Шприц 5 мл. - 1 шт.;
- Колпачок инъекционный - 2 шт.;
- Фиксатор катетера 5F - 1 шт.;
- Инструкция по применению- 1 шт.

2.8. Набор для катетеризации центральных вен Shunmei двухпросветный, диаметр 5 Fr (1,67 мм.) длина 16 см. в составе:

- Катетер центральный венозный двухпросветный, диаметр 5 Fr (1,67 мм) длина 16 см. - 1 шт.;
- Направитель проволоочный 0,021 дюйма (0,53 мм.) x 45 см. - 1 шт.;
- Игла интродьюсерная 20G - 1 шт.;
- Расширитель 6F x 8 см. - 1 шт.;
- Скальпель - 1 шт.;
- Шприц 5 мл. - 1 шт.;
- Колпачок инъекционный - 2 шт.;
- Фиксатор катетера 5F - 1 шт.;
- Инструкция по применению- 1 шт.

2.9. Набор для катетеризации центральных вен Shunmei двухпросветный, диаметр 5 Fr (1,67 мм.) длина 20 см. в составе:

- Катетер центральный венозный двухпросветный, диаметр 5 Fr (1,67 мм) длина 20 см. - 1 шт.;

- Guide wire 0,021 inch (0,53 mm.) x 45 cm. - 1 pc.;
- Introducer needle 20Ga - 1 pc.;
- Dilator 6F x 8 cm. - 1 pc.;
- Scalpel- 1 pc.;
- Syringe 5 ml. - 1 pc.;
- Injection cap - 2 pc.;
- Catheter clamp 5F - 1 pc.;
- Instructions for use - 1 pc.

2.8. Central venous catheter kit Shunmei Double lumen, diameter 5 Fr (1,67 mm.) length 16 cm. consists of:

- Central venous catheter Double lumen, diameter 5 Fr (1,67 mm) length 16 cm. - 1 pc.;
- Guide wire 0,021 inch (0,53 mm.) x 45 cm. - 1 pc.;
- Introducer needle 20Ga - 1 pc.;
- Dilator 6F x 8 cm. - 1 pc.;
- Scalpel- 1 pc.;
- Syringe 5 ml. - 1 pc.;
- Injection cap - 2 pc.;
- Catheter clamp 5F - 1 pc.;
- Instructions for use - 1 pc.

2.9. Central venous catheter kit Shunmei Double lumen, diameter 5 Fr (1,67 mm.) length 20 cm. consists of:

- Central venous catheter Double lumen, diameter 5 Fr (1,67 mm) length 20 cm. - 1 pc.;
- Guide wire 0,021 inch (0,53 mm.) x 45 cm. - 1 pc.;
- Introducer needle 20Ga - 1 pc.;
- Dilator 6F x 8 cm. - 1 pc.;
- Scalpel- 1 pc.;
- Syringe 5 ml. - 1 pc.;
- Injection cap - 2 pc.;
- Catheter clamp 5F - 1 pc.;

- Направитель проволоочный 0,021 дюйма (0,53 мм.) x 45 см. - 1 шт.;
 - Игла интродьюсерная 20Ga - 1 шт.;
 - Расширитель 6F x 8 см. - 1 шт.;
 - Скальпель - 1 шт.;
 - Шприц 5 мл. - 1 шт.;
 - Колпачок инъекционный - 2 шт.;
 - Фиксатор катетера 5F - 1 шт.;
 - Инструкция по применению- 1 шт.
- 2.10. Набор для катетеризации центральных вен Shunmei двухпросветный, диаметр 7 Fr (2,33 мм.) длина 15 см. в составе:
- Катетер центральный венозный двухпросветный, диаметр 7 Fr (2,33 мм) длина 15 см. - 1 шт.;
 - Направитель проволоочный 0,032 дюйма (0,81 мм.) x 60 см. - 1 шт.;
 - Игла интродьюсерная 18Ga - 1 шт.;
 - Расширитель 8F x 10 см. - 1 шт.;
 - Скальпель - 1 шт.;
 - Шприц 5 мл. - 1 шт.;
 - Колпачок инъекционный - 2 шт.;
 - Фиксатор катетера 7F - 1 шт.;
 - Инструкция по применению- 1 шт.
- 2.11. Набор для катетеризации центральных вен Shunmei двухпросветный, диаметр 7 Fr (2,33 мм.) длина 16 см. в составе:
- Катетер центральный венозный двухпросветный, диаметр 7 Fr (2,33 мм) длина 16 см. - 1 шт.;
 - Направитель проволоочный 0,032 дюйма (0,81 мм.) x 60 см. - 1 шт.;
 - Игла интродьюсерная 18Ga - 1 шт.;
 - Расширитель 8F x 10 см. - 1 шт.;
 - Скальпель - 1 шт.;
 - Шприц 5 мл. - 1 шт.;
 - Колпачок инъекционный - 2 шт.;

- Instructions for use - 1 pc.
- 2.10. Central venous catheter kit Shunmei Double lumen, diameter 7 Fr (2,33 mm.) length 15 cm. consists of:
- Central venous catheter Double lumen, diameter 7 Fr (2,33 mm) length 15 cm. - 1 pc.;
 - Guide wire 0,032 inch (0,81 mm.) x 60 cm. - 1 pc.;
 - Introducer needle 18Ga - 1 pc.;
 - Dilator 8F x 10 cm. - 1 pc.;
 - Scalpel- 1 pc.;
 - Syringe 5 ml. - 1 pc.;
 - Injection cap - 2 pc.;
 - Catheter clamp 7F - 1 pc.;
 - Instructions for use - 1 pc.
- 2.11. Central venous catheter kit Shunmei Double lumen, diameter 7 Fr (2,33 mm.) length 16 cm. consists of:
- Central venous catheter Double lumen, diameter 7 Fr (2,33 mm) length 16 cm. - 1 pc.;
 - Guide wire 0,032 inch (0,81 mm.) x 60 cm. - 1 pc.;
 - Introducer needle 18Ga - 1 pc.;
 - Dilator 8F x 10 cm. - 1 pc.;
 - Scalpel- 1 pc.;
 - Syringe 5 ml. - 1 pc.;
 - Injection cap - 2 pc.;
 - Catheter clamp 7F - 1 pc.;
 - Instructions for use - 1 pc.
- 2.12. Central venous catheter kit Shunmei Double lumen, diameter 7 Fr (2,33 mm.) length 18 cm. consists of:
- Central venous catheter Double lumen, diameter 7 Fr (2,33 mm) length 18 cm. - 1 pc.;
 - Guide wire 0,032 inch (0,81 mm.) x 60 cm. - 1 pc.;
 - Introducer needle 18Ga - 1 pc.;

- Фиксатор катетера 7F - 1 шт.;
- Инструкция по применению- 1 шт.
- 2.12. Набор для катетеризации центральных вен Shunmei двухпросветный, диаметр 7 Fr (2,33 мм.) длина 18 см. в составе:
 - Катетер центральный венозный двухпросветный, диаметр 7 Fr (2,33 мм) длина 18 см. - 1 шт.;
 - Направитель проволоочный 0,032 дюйма (0,81 мм.) x 60 см. - 1 шт.;
 - Игла интродьюсерная 18Ga - 1 шт.;
 - Расширитель 8F x 10 см. - 1 шт.;
 - Скальпель - 1 шт.;
 - Шприц 5 мл. - 1 шт.;
 - Колпачок инъекционный - 2 шт.;
 - Фиксатор катетера 7F - 1 шт.;
 - Инструкция по применению- 1 шт.
- 2.13. Набор для катетеризации центральных вен Shunmei двухпросветный, диаметр 7 Fr (2,33 мм.) длина 20 см. в составе:
 - Катетер центральный венозный двухпросветный, диаметр 7 Fr (2,33 мм) длина 20 см. - 1 шт.;
 - Направитель проволоочный 0,032 дюйма (0,81 мм.) x 60 см. - 1 шт.;
 - Игла интродьюсерная 18Ga - 1 шт.;
 - Расширитель 8F x 10 см. - 1 шт.;
 - Скальпель - 1 шт.;
 - Шприц 5 мл. - 1 шт.;
 - Колпачок инъекционный - 2 шт.;
 - Фиксатор катетера 7F - 1 шт.;
 - Инструкция по применению- 1 шт.
- 2.14. Набор для катетеризации центральных вен Shunmei двухпросветный, диаметр 7 Fr (2,33 мм.) длина 30 см. в составе:
 - Катетер центральный венозный двухпросветный, диаметр 7 Fr (2,33 мм) длина 30 см. - 1 шт.;
 - Направитель проволоочный 0,032 дюйма (0,81 мм.) x 60 см. - 1

- Dilator 8F x 10 cm. - 1 pc.;
- Scalpel- 1 pc.;
- Syringe 5 ml. - 1 pc.;
- Injection cap - 2 pc.;
- Catheter clamp 7F - 1 pc.;
- Instructions for use - 1 pc.
- 2.13. Central venous catheter kit Shunmei Double lumen, diameter 7 Fr (2,33 mm.) length 20 cm. consists of:
 - Central venous catheter Double lumen, diameter 7 Fr (2,33 mm) length 20 cm. - 1 pc.;
 - Guide wire 0,032 inch (0,81 mm.) x 60 cm. - 1 pc.;
 - Introducer needle 18Ga - 1 pc.;
 - Dilator 8F x 10 cm. - 1 pc.;
 - Scalpel- 1 pc.;
 - Syringe 5 ml. - 1 pc.;
 - Injection cap - 2 pc.;
 - Catheter clamp 7F - 1 pc.;
 - Instructions for use - 1 pc.
- 2.14. Central venous catheter kit Shunmei Double lumen, diameter 7 Fr (2,33 mm.) length 30 cm. consists of:
 - Central venous catheter Double lumen, diameter 7 Fr (2,33 mm) length 30 cm. - 1 pc.;
 - Guide wire 0,032 inch (0,81 mm.) x 60 cm. - 1 pc.;
 - Introducer needle 18Ga - 1 pc.;
 - Dilator 8F x 10 cm. - 1 pc.;
 - Scalpel- 1 pc.;
 - Syringe 5 ml. - 1 pc.;
 - Injection cap - 2 pc.;
 - Catheter clamp 7F - 1 pc.;
 - Instructions for use - 1 pc.
- 2.15. Central venous catheter kit Shunmei Double lumen,

шт.; — Игла интродьюсерная 18Ga - 1 шт.; — Расширитель 8F x 10 см. - 1 шт.; — Скальпель - 1 шт.; — Шприц 5 мл. - 1 шт.; — Колпачок инъекционный - 2 шт.; — Фиксатор катетера 7F - 1 шт.; — Инструкция по применению- 1 шт. 2.15. Набор для катетеризации центральных вен Shunmei двухпросветный, диаметр 8 Fr (2,66 мм.) длина 15 см. в составе: — Катетер центральный венозный двухпросветный, диаметр 8 Fr (2,66 мм) длина 15 см. - 1 шт.; — Направитель проволочный 0,032 дюйма (0,81 мм.) x 60 см. - 1 шт.; — Игла интродьюсерная 18Ga - 1 шт.; — Расширитель 9F x 10 см. - 1 шт.; — Скальпель - 1 шт.; — Шприц 5 мл. - 1 шт.; — Колпачок инъекционный - 2 шт.; — Фиксатор катетера 8F - 1 шт.; — Инструкция по применению- 1 шт. 2.16. Набор для катетеризации центральных вен Shunmei двухпросветный, диаметр 8 Fr (2,66 мм.) длина 16 см. в составе: — Катетер центральный венозный двухпросветный, диаметр 8 Fr (2,66 мм) длина 16 см. - 1 шт.; — Направитель проволочный 0,032 дюйма (0,81 мм.) x 60 см. - 1 шт.; — Игла интродьюсерная 18Ga - 1 шт.; — Расширитель 9F x 10 см. - 1 шт.; — Скальпель - 1 шт.; — Шприц 5 мл. - 1 шт.; — Колпачок инъекционный - 2 шт.; — Фиксатор катетера 8F - 1 шт.;	diameter 8 Fr (2,66 мм.) length 15 cm. consists of: — Central venous catheter Double lumen, diameter 8 Fr (2,66 mm) length 15 cm. - 1 pc.; — Guide wire 0,032 inch (0,81 mm.) x 60 cm. - 1 pc.; — Introducer needle 18Ga - 1 pc.; — Dilator 9F x 10 cm. - 1 pc.; — Scalpel- 1 pc.; — Syringe 5 ml. - 1 pc.; — Injection cap - 2 pc.; — Catheter clamp 8F - 1 pc.; — Instructions for use - 1 pc. 2.16. Central venous catheter kit Shunmei Double lumen, diameter 8 Fr (2,66 мм.) length 16 cm. consists of: — Central venous catheter Double lumen, diameter 8 Fr (2,66 mm) length 16 cm. - 1 pc.; — Guide wire 0,032 inch (0,81 mm.) x 60 cm. - 1 pc.; — Introducer needle 18Ga - 1 pc.; — Dilator 9F x 10 cm. - 1 pc.; — Scalpel- 1 pc.; — Syringe 5 ml. - 1 pc.; — Injection cap - 2 pc.; — Catheter clamp 8F - 1 pc.; — Instructions for use - 1 pc. 2.17. Central venous catheter kit Shunmei Double lumen, diameter 8 Fr (2,66 мм.) length 20 cm. consists of: — Central venous catheter Double lumen, diameter 8 Fr (2,66 mm) length 20 cm. - 1 pc.; — Guide wire 0,032 inch (0,81 mm.) x 60 cm. - 1 pc.; — Introducer needle 18Ga - 1 pc.; — Dilator 9F x 10 cm. - 1 pc.; — Scalpel- 1 pc.;
--	---

- Инструкция по применению- 1 шт.
- 2.17. Набор для катетеризации центральных вен Shunmei двухпросветный, диаметр 8 Fr (2,66 мм.) длина 20 см. в составе:
 - Катетер центральный венозный двухпросветный, диаметр 8 Fr (2,66 мм) длина 20 см. - 1 шт.;
 - Направитель проволоочный 0,032 дюйма (0,81 мм.) x 60 см. - 1 шт.;
 - Игла интродьюсерная 18Ga - 1 шт.;
 - Расширитель 9F x 10 см. - 1 шт.;
 - Скальпель - 1 шт.;
 - Шприц 5 мл. - 1 шт.;
 - Колпачок инъекционный - 2 шт.;
 - Фиксатор катетера 8F - 1 шт.;
 - Инструкция по применению- 1 шт.
- 2.18. Набор для катетеризации центральных вен Shunmei двухпросветный, диаметр 8 Fr (2,66 мм.) длина 30 см. в составе:
 - Катетер центральный венозный двухпросветный, диаметр 8 Fr (2,66 мм) длина 30 см. - 1 шт.;
 - Направитель проволоочный 0,032 дюйма (0,81 мм.) x 60 см. - 1 шт.;
 - Игла интродьюсерная 18Ga - 1 шт.;
 - Расширитель 9F x 10 см. - 1 шт.;
 - Скальпель - 1 шт.;
 - Шприц 5 мл. - 1 шт.;
 - Колпачок инъекционный - 2 шт.;
 - Фиксатор катетера 8F - 1 шт.;
 - Инструкция по применению- 1 шт.
- 3. Набор для катетеризации центральных вен Shunmei трехпросветный в вариантах исполнения:
 - 3.1. Набор для катетеризации центральных вен Shunmei трехпросветный, диаметр 5 Fr (1,67 мм.) длина 13 см. в составе:
 - Катетер центральный венозный трехпросветный, диаметр 5 Fr

- Syringe 5 ml. - 1 pc.;
- Injection cap - 2 pc.;
- Catheter clamp 8F - 1 pc.;
- Instructions for use - 1 pc.
- 2.18. Central venous catheter kit Shunmei Double lumen, diameter 8 Fr (2,66 mm.) length 30 cm. consists of:
 - Central venous catheter Double lumen, diameter 8 Fr (2,66 mm) length 30 cm. - 1 pc.;
 - Guide wire 0,032 inch (0,81 mm.) x 60 cm. - 1 pc.;
 - Introducer needle 18Ga - 1 pc.;
 - Dilator 9F x 10 cm. - 1 pc.;
 - Scalpel- 1 pc.;
 - Syringe 5 ml. - 1 pc.;
 - Injection cap - 2 pc.;
 - Catheter clamp 8F - 1 pc.;
 - Instructions for use - 1 pc.
- 3. Central venous catheter kit Shunmei Triple lumen in variants:
 - 3.1. Central venous catheter kit Shunmei Triple lumen, diameter 5 Fr (1,67 mm.) length 13 cm. consists of:
 - Central venous catheter Triple lumen, diameter 5 Fr (1,67 mm) length 13 cm. - 1 pc.;
 - Guide wire 0,021 inch (0,53 mm.) x 45 cm. - 1 pc.;
 - Introducer needle 20Ga - 1 pc.;
 - Dilator 6F x 8 cm. - 1 pc.;
 - Scalpel- 1 pc.;
 - Syringe 5 ml. - 1 pc.;
 - Injection cap - 3 pc.;
 - Catheter clamp 6F - 1 pc.;
 - Instructions for use - 1 pc.
 - 3.2. Central venous catheter kit Shunmei Triple lumen, diameter

(1,67 мм) длина 13 см. - 1 шт.; — Направитель проволоочный 0,021 дюйма (0,53 мм.) x 45 см. - 1 шт.; — Игла интродьюсерная 20Ga - 1 шт.; — Расширитель 6F x 8 см. - 1 шт.; — Скальпель - 1 шт.; — Шприц 5 мл. - 1 шт.; — Колпачок инъекционный - 3 шт.; — Фиксатор катетера 6F - 1 шт.; — Инструкция по применению - 1 шт. 3.2. Набор для катетеризации центральных вен Shunmei трехпросветный, диаметр 5,5 Fr (1,83 мм.) длина 8 см. в составе: — Катетер центральный венозный трехпросветный, диаметр 5,5 Fr (1,83 мм) длина 8 см. - 1 шт.; — Направитель проволоочный 0,021 дюйма (0,53 мм.) x 45 см. - 1 шт.; — Игла интродьюсерная 20Ga - 1 шт.; — Расширитель 6F x 8 см. - 1 шт.; — Скальпель - 1 шт.; — Шприц 5 мл. - 1 шт.; — Колпачок инъекционный - 3 шт.; — Фиксатор катетера 6F - 1 шт.; — Инструкция по применению - 1 шт. 3.3. Набор для катетеризации центральных вен Shunmei трехпросветный, диаметр 5,5 Fr (1,83 мм.) длина 13 см. в составе: — Катетер центральный венозный трехпросветный, диаметр 5,5 Fr (1,83 мм) длина 13 см. - 1 шт.; — Направитель проволоочный 0,021 дюйма (0,53 мм.) x 45 см. - 1 шт.; — Игла интродьюсерная 20Ga - 1 шт.; — Расширитель 6F x 8 см. - 1 шт.; — Скальпель - 1 шт.;	5,5 Fr (1,83 мм.) length 8 cm. consists of: — Central venous catheter Triple lumen, diameter 5,5 Fr (1,83 mm) length 8 cm. - 1 pc.; — Guide wire 0,021 inch (0,53 mm.) x 45 cm. - 1 pc.; — Introducer needle 20Ga - 1 pc.; — Dilator 6F x 8 cm. - 1 pc.; — Scalpel- 1 pc.; — Syringe 5 ml. - 1 pc.; — Injection cap - 3 pc.; — Catheter clamp 6F - 1 pc.; — Instructions for use - 1 pc. 3.3. Central venous catheter kit Shunmei Triple lumen, diameter 5,5 Fr (1,83 мм.) length 13 cm. consists of: — Central venous catheter Triple lumen, diameter 5,5 Fr (1,83 mm) length 13 cm. - 1 pc.; — Guide wire 0,021 inch (0,53 mm.) x 45 cm. - 1 pc.; — Introducer needle 20Ga - 1 pc.; — Dilator 6F x 8 cm. - 1 pc.; — Scalpel- 1 pc.; — Syringe 5 ml. - 1 pc.; — Injection cap - 3 pc.; — Catheter clamp 6F - 1 pc.; — Instructions for use - 1 pc. 3.4. Central venous catheter kit Shunmei Triple lumen, diameter 5,5 Fr (1,83 мм.) length 15 cm. consists of: — Central venous catheter Triple lumen, diameter 5,5 Fr (1,83 mm) length 15 cm. - 1 pc.; — Guide wire 0,021 inch (0,53 mm.) x 45 cm. - 1 pc.; — Introducer needle 20Ga - 1 pc.; — Dilator 6F x 8 cm. - 1 pc.; — Scalpel- 1 pc.;
--	---

- Шприц 5 мл. - 1 шт.;
- Колпачок инъекционный - 3 шт.;
- Фиксатор катетера 6F - 1 шт.;
- Инструкция по применению- 1 шт.
- 3.4. Набор для катетеризации центральных вен Shunmei трехпросветный, диаметр 5,5 Fr (1,83 мм.) длина 15 см. в составе:
 - Катетер центральный венозный трехпросветный, диаметр 5,5 Fr (1,83 мм) длина 15 см. - 1 шт.;
 - Направитель проволоочный 0,021 дюйма (0,53 мм.) x 45 см. - 1 шт.;
 - Игла интродьюсерная 20Ga - 1 шт.;
 - Расширитель 6F x 8 см. - 1 шт.;
 - Скальпель - 1 шт.;
 - Шприц 5 мл. - 1 шт.;
 - Колпачок инъекционный - 3 шт.;
 - Фиксатор катетера 6F - 1 шт.;
 - Инструкция по применению- 1 шт.
- 3.5. Набор для катетеризации центральных вен Shunmei трехпросветный, диаметр 5,5 Fr (1,83 мм.) длина 16 см. в составе:
 - Катетер центральный венозный трехпросветный, диаметр 5,5 Fr (1,83 мм) длина 16 см. - 1 шт.;
 - Направитель проволоочный 0,021 дюйма (0,53 мм.) x 45 см. - 1 шт.;
 - Игла интродьюсерная 20Ga - 1 шт.;
 - Расширитель 6F x 8 см. - 1 шт.;
 - Скальпель - 1 шт.;
 - Шприц 5 мл. - 1 шт.;
 - Колпачок инъекционный - 3 шт.;
 - Фиксатор катетера 6F - 1 шт.;
 - Инструкция по применению- 1 шт.
- 3.6. Набор для катетеризации центральных вен Shunmei

- Syringe 5 ml. - 1 pc.;
- Injection cap - 3 pc.;
- Catheter clamp 6F - 1 pc.;
- Instructions for use - 1 pc.
- 3.5. Central venous catheter kit Shunmei Triple lumen, diameter 5,5 Fr (1,83 mm.) length 16 cm. consists of:
 - Central venous catheter Triple lumen, diameter 5,5 Fr (1,83 mm) length 16 cm. - 1 pc.;
 - Guide wire 0,021 inch (0,53 mm.) x 45 cm. - 1 pc.;
 - Introducer needle 20Ga - 1 pc.;
 - Dilator 6F x 8 cm. - 1 pc.;
 - Scalpel- 1 pc.;
 - Syringe 5 ml. - 1 pc.;
 - Injection cap - 3 pc.;
 - Catheter clamp 6F - 1 pc.;
 - Instructions for use - 1 pc.
- 3.6. Central venous catheter kit Shunmei Triple lumen, diameter 5,5 Fr (1,83 mm.) length 20 cm. consists of:
 - Central venous catheter Triple lumen, diameter 5,5 Fr (1,83 mm) length 20 cm. - 1 pc.;
 - Guide wire 0,021 inch (0,53 mm.) x 45 cm. - 1 pc.;
 - Introducer needle 20Ga - 1 pc.;
 - Dilator 6F x 8 cm. - 1 pc.;
 - Scalpel- 1 pc.;
 - Syringe 5 ml. - 1 pc.;
 - Injection cap - 3 pc.;
 - Catheter clamp 6F - 1 pc.;
 - Instructions for use - 1 pc.
- 3.7. Central venous catheter kit Shunmei Triple lumen, diameter 7 Fr (2,33 mm.) length 15 cm. consists of:
 - Central venous catheter Triple lumen, diameter 7 Fr (2,33

трехпросветный, диаметр 5,5 Fr (1,83 мм.) длина 20 см. в составе:

- Катетер центральный венозный трехпросветный, диаметр 5,5 Fr (1,83 мм) длина 20 см. - 1 шт.;
- Направитель проволоочный 0,021 дюйма (0,53 мм.) x 45 см. - 1 шт.;
- Игла интродьюсерная 20Ga - 1 шт.;
- Расширитель 6F x 8 см. - 1 шт.;
- Скальпель - 1 шт.;
- Шприц 5 мл. - 1 шт.;
- Колпачок инъекционный - 3 шт.;
- Фиксатор катетера 6F - 1 шт.;
- Инструкция по применению- 1 шт.

3.7. Набор для катетеризации центральных вен Shunmei трехпросветный, диаметр 7 Fr (2,33 мм.) длина 15 см. в составе:

- Катетер центральный венозный трехпросветный, диаметр 7 Fr (2,33 мм) длина 15 см. - 1 шт.;
- Направитель проволоочный 0,032 дюйма (0,81 мм.) x 60 см. - 1 шт.;
- Игла интродьюсерная 18Ga - 1 шт.;
- Расширитель 8F x 10 см. - 1 шт.;
- Скальпель - 1 шт.;
- Шприц 5 мл. - 1 шт.;
- Колпачок инъекционный - 3 шт.;
- Фиксатор катетера 7F - 1 шт.;
- Инструкция по применению- 1 шт.

3.8. Набор для катетеризации центральных вен Shunmei трехпросветный, диаметр 7 Fr (2,33 мм.) длина 16 см. в составе:

- Катетер центральный венозный трехпросветный, диаметр 7 Fr (2,33 мм) длина 16 см. - 1 шт.;
- Направитель проволоочный 0,032 дюйма (0,81 мм.) x 60 см. - 1 шт.;
- Игла интродьюсерная 18Ga - 1 шт.;

mm) length 15 cm. - 1 pc.;

- Guide wire 0,032 inch (0,81 mm.) x 60 cm. - 1 pc.;
- Introducer needle 18Ga - 1 pc.;
- Dilator 8F x 10 cm. - 1 pc.;
- Scalpel- 1 pc.;
- Syringe 5 ml. - 1 pc.;
- Injection cap - 3 pc.;
- Catheter clamp 7F - 1 pc.;
- Instructions for use - 1 pc.

3.8. Central venous catheter kit Shunmei Triple lumen, diameter 7 Fr (2,33 mm.) length 16 cm. consists of:

- Central venous catheter Triple lumen, diameter 7 Fr (2,33 mm) length 16 cm. - 1 pc.;
- Guide wire 0,032 inch (0,81 mm.) x 60 cm. - 1 pc.;
- Introducer needle 18Ga - 1 pc.;
- Dilator 8F x 10 cm. - 1 pc.;
- Scalpel- 1 pc.;
- Syringe 5 ml. - 1 pc.;
- Injection cap - 3 pc.;
- Catheter clamp 7F - 1 pc.;
- Instructions for use - 1 pc.

3.9. Central venous catheter kit Shunmei Triple lumen, diameter 7 Fr (2,33 mm.) length 18 cm. consists of:

- Central venous catheter Triple lumen, diameter 7 Fr (2,33 mm) length 18 cm. - 1 pc.;
- Guide wire 0,032 inch (0,81 mm.) x 60 cm. - 1 pc.;
- Introducer needle 18Ga - 1 pc.;
- Dilator 8F x 10 cm. - 1 pc.;
- Scalpel- 1 pc.;
- Syringe 5 ml. - 1 pc.;
- Injection cap - 3 pc.;

- Расширитель 8F x 10 см. - 1 шт.;
 - Скальпель - 1 шт.;
 - Шприц 5 мл. - 1 шт.;
 - Колпачок инъекционный - 3 шт.;
 - Фиксатор катетера 7F - 1 шт.;
 - Инструкция по применению- 1 шт.
- 3.9. Набор для катетеризации центральных вен Shunmei трехпросветный, диаметр 7 Fr (2,33 мм.) длина 18 см. в составе:
- Катетер центральный венозный трехпросветный, диаметр 7 Fr (2,33 мм) длина 18 см. - 1 шт.;
 - Направитель проволоочный 0,032 дюйма (0,81 мм.) x 60 см. - 1 шт.;
 - Игла интродьюсерная 18Ga - 1 шт.;
 - Расширитель 8F x 10 см. - 1 шт.;
 - Скальпель - 1 шт.;
 - Шприц 5 мл. - 1 шт.;
 - Колпачок инъекционный - 3 шт.;
 - Фиксатор катетера 7F - 1 шт.;
 - Инструкция по применению- 1 шт.
- 3.10. Набор для катетеризации центральных вен Shunmei трехпросветный, диаметр 7 Fr (2,33 мм.) длина 20 см. в составе:
- Катетер центральный венозный трехпросветный, диаметр 7 Fr (2,33 мм) длина 20 см. - 1 шт.;
 - Направитель проволоочный 0,032 дюйма (0,81 мм.) x 60 см. - 1 шт.;
 - Игла интродьюсерная 18Ga - 1 шт.;
 - Расширитель 8F x 10 см. - 1 шт.;
 - Скальпель - 1 шт.;
 - Шприц 5 мл. - 1 шт.;
 - Колпачок инъекционный - 3 шт.;
 - Фиксатор катетера 7F - 1 шт.;
 - Инструкция по применению- 1 шт.
- 3.11. Набор для катетеризации центральных вен Shunmei

- Catheter clamp 7F - 1 pc.;
 - Instructions for use - 1 pc.
- 3.10. Central venous catheter kit Shunmei Triple lumen, diameter 7 Fr (2,33 mm.) length 20 cm. consists of:
- Central venous catheter Triple lumen, diameter 7 Fr (2,33 mm) length 20 cm. - 1 pc.;
 - Guide wire 0,032 inch (0,81 mm.) x 60 cm. - 1 pc.;
 - Introducer needle 18Ga - 1 pc.;
 - Dilator 8F x 10 cm. - 1 pc.;
 - Scalpel- 1 pc.;
 - Syringe 5 ml. - 1 pc.;
 - Injection cap - 3 pc.;
 - Catheter clamp 7F - 1 pc.;
 - Instructions for use - 1 pc.
- 3.11. Central venous catheter kit Shunmei Triple lumen, diameter 7 Fr (2,33 mm.) length 30 cm. consists of:
- Central venous catheter Triple lumen, diameter 7 Fr (2,33 mm) length 30 cm. - 1 pc.;
 - Guide wire 0,032 inch (0,81 mm.) x 60 cm. - 1 pc.;
 - Introducer needle 18Ga - 1 pc.;
 - Dilator 8F x 10 cm. - 1 pc.;
 - Scalpel- 1 pc.;
 - Syringe 5 ml. - 1 pc.;
 - Injection cap - 3 pc.;
 - Catheter clamp 7F - 1 pc.;
 - Instructions for use - 1 pc.
- 3.12. Central venous catheter kit Shunmei Triple lumen, diameter 8 Fr (2,67 mm.) length 20 cm. consists of:
- Central venous catheter Triple lumen, diameter 8 Fr (2,67 mm) length 20 cm. - 1 pc.;
 - Guide wire 0,032 inch (0,81 mm.) x 60 cm. - 1 pc.;

- трехпросветный, диаметр 7 Fr (2,33 мм.) длина 30 см. в составе:
- Катетер центральный венозный трехпросветный, диаметр 7 Fr (2,33 мм) длина 30 см. - 1 шт.;
 - Направитель проволоочный 0,032 дюйма (0,81 мм.) x 60 см. - 1 шт.;
 - Игла интродьюсерная 18Ga - 1 шт.;
 - Расширитель 8F x 10 см. - 1 шт.;
 - Скальпель - 1 шт.;
 - Шприц 5 мл. - 1 шт.;
 - Колпачок инъекционный - 3 шт.;
 - Фиксатор катетера 7F - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
- 3.12. Набор для катетеризации центральных вен Shunmei трехпросветный, диаметр 8 Fr (2,67 мм.) длина 20 см. в составе:
- Катетер центральный венозный трехпросветный, диаметр 8 Fr (2,67 мм) длина 20 см. - 1 шт.;
 - Направитель проволоочный 0,032 дюйма (0,81 мм.) x 60 см. - 1 шт.;
 - Игла интродьюсерная 18Ga - 1 шт.;
 - Расширитель 9F x 10 см. - 1 шт.;
 - Скальпель - 1 шт.;
 - Шприц 5 мл. - 1 шт.;
 - Колпачок инъекционный - 3 шт.;
 - Фиксатор катетера 8F - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
- 3.13. Набор для катетеризации центральных вен Shunmei трехпросветный, диаметр 8,5 Fr (2,83 мм.) длина 15 см. в составе:
- Катетер центральный венозный трехпросветный, диаметр 8,5 Fr (2,83 мм) длина 15 см. - 1 шт.;
 - Направитель проволоочный 0,032 дюйма (0,81 мм.) x 60 см. - 1 шт.;
 - Игла интродьюсерная 18Ga - 1 шт.;

- Introducer needle 18Ga - 1 pc.;
- Dilator 9F x 10 cm. - 1 pc.;
- Scalpel- 1 pc.;
- Syringe 5 ml. - 1 pc.;
- Injection cap - 3 pc.;
- Catheter clamp 8F - 1 pc.;
- Instructions for use - 1 pc.

3.13. Central venous catheter kit Shunmei Triple lumen, diameter 8,5 Fr (2,83 mm.) length 15 cm. consists of:

- Central venous catheter Triple lumen, diameter 8,5 Fr (2,83 mm) length 15 cm. - 1 pc.;
- Guide wire 0,032 inch (0,81 mm.) x 60 cm. - 1 pc.;
- Introducer needle 18Ga - 1 pc.;
- Dilator 9F x 10 cm. - 1 pc.;
- Scalpel- 1 pc.;
- Syringe 5 ml. - 1 pc.;
- Injection cap - 3 pc.;
- Catheter clamp 8F - 1 pc.;
- Instructions for use - 1 pc.

3.14. Central venous catheter kit Shunmei Triple lumen, diameter 8,5 Fr (2,83 mm.) length 16 cm. consists of:

- Central venous catheter Triple lumen, diameter 8,5 Fr (2,83 mm) length 16 cm. - 1 pc.;
- Guide wire 0,032 inch (0,81 mm.) x 60 cm. - 1 pc.;
- Introducer needle 18Ga - 1 pc.;
- Dilator 9F x 10 cm. - 1 pc.;
- Scalpel- 1 pc.;
- Syringe 5 ml. - 1 pc.;
- Injection cap - 3 pc.;
- Catheter clamp 8F - 1 pc.;
- Instructions for use - 1 pc.

- Расширитель 9F x 10 см. - 1 шт.;
- Скальпель - 1 шт.;
- Шприц 5 мл. - 1 шт.;
- Колпачок инъекционный - 3 шт.;
- Фиксатор катетера 8F - 1 шт.;
- Инструкция по применению- 1 шт.

3.14. Набор для катетеризации центральных вен Shunmei трехпросветный, диаметр 8,5 Fr (2,83 мм.) длина 16 см. в составе:

- Катетер центральный венозный трехпросветный, диаметр 8,5 Fr (2,83 мм) длина 16 см. - 1 шт.;
- Направитель проволоочный 0,032 дюйма (0,81 мм.) x 60 см. - 1 шт.;
- Игла интродьюсерная 18Ga - 1 шт.;
- Расширитель 9F x 10 см. - 1 шт.;
- Скальпель - 1 шт.;
- Шприц 5 мл. - 1 шт.;
- Колпачок инъекционный - 3 шт.;
- Фиксатор катетера 8F - 1 шт.;
- Инструкция по применению- 1 шт.

3.15. Набор для катетеризации центральных вен Shunmei трехпросветный, диаметр 8,5 Fr (2,83 мм.) длина 20 см. в составе:

- Катетер центральный венозный трехпросветный, диаметр 8,5 Fr (2,83 мм) длина 20 см. - 1 шт.;
- Направитель проволоочный 0,032 дюйма (0,81 мм.) x 60 см. - 1 шт.;
- Игла интродьюсерная 18Ga - 1 шт.;
- Расширитель 9F x 10 см. - 1 шт.;
- Скальпель - 1 шт.;
- Шприц 5 мл. - 1 шт.;
- Колпачок инъекционный - 3 шт.;
- Фиксатор катетера 8F - 1 шт.;

3.15. Central venous catheter kit Shunmei Triple lumen, diameter 8,5 Fr (2,83 mm.) length 20 cm. consists of:

- Central venous catheter Triple lumen, diameter 8,5 Fr (2,83 mm) length 20 cm. - 1 pc.;
- Guide wire 0,032 inch (0,81 mm.) x 60 cm. - 1 pc.;
- Introducer needle 18Ga - 1 pc.;
- Dilator 9F x 10 cm. - 1 pc.;
- Scalpel- 1 pc.;
- Syringe 5 ml. - 1 pc.;
- Injection cap - 3 pc.;
- Catheter clamp 8F - 1 pc.;
- Instructions for use - 1 pc.

3.16. Central venous catheter kit Shunmei Triple lumen, diameter 8,5 Fr (2,83 mm.) length 30 cm. consists of:

- Central venous catheter Triple lumen, diameter 8,5 Fr (2,83 mm) length 30 cm. - 1 pc.;
- Guide wire 0,032 inch (0,81 mm.) x 60 cm. - 1 pc.;
- Introducer needle 18Ga - 1 pc.;
- Dilator 9F x 10 cm. - 1 pc.;
- Scalpel- 1 pc.;
- Syringe 5 ml. - 1 pc.;
- Injection cap - 3 pc.;
- Catheter clamp 8F - 1 pc.;
- Instructions for use - 1 pc.

4. Central venous catheter kit Shunmei Shunmei Quad lumen in variants:

4.1. Central venous catheter kit Shunmei Quad lumen, diameter 8,5 Fr (2,83 mm.) length 15 cm. consists of:

- Central venous catheter Quad lumen, diameter 8,5 Fr (2,83 mm) length 15 cm. - 1 pc.;
- Guide wire 0,032 inch (0,81 mm.) x 60 cm. - 1 pc.;

- Инструкция по применению- 1 шт.
- 3.16. Набор для катетеризации центральных вен Shunmei трехпросветный, диаметр 8,5 Fr (2,83 мм.) длина 30 см. в составе:
 - Катетер центральный венозный трехпросветный, диаметр 8,5 Fr (2,83 мм) длина 30 см. - 1 шт.;
 - Направитель проволоочный 0,032 дюйма (0,81 мм.) x 60 см. - 1 шт.;
 - Игла интродюсерная 18Ga - 1 шт.;
 - Расширитель 9F x 10 см. - 1 шт.;
 - Скальпель - 1 шт.;
 - Шприц 5 мл. - 1 шт.;
 - Колпачок инъекционный - 3 шт.;
 - Фиксатор катетера 8F - 1 шт.;
 - Инструкция по применению- 1 шт.
- 4. Наборы для катетеризации центральных вен Shunmei четырехпросветный в вариантах исполнения:
 - 4.1. Набор для катетеризации центральных вен Shunmei четырехпросветный, диаметр 8,5 Fr (2,83 мм.) длина 15 см. в составе:
 - Катетер центральный венозный четырехпросветный, диаметр 8,5 Fr (2,83 мм) длина 15 см. - 1 шт.;
 - Направитель проволоочный 0,032 дюйма (0,81 мм.) x 60 см. - 1 шт.;
 - Игла интродюсерная 18Ga - 1 шт.;
 - Расширитель 9F x 10 см. - 1 шт.;
 - Скальпель - 1 шт.;
 - Шприц 5 мл. - 1 шт.;
 - Колпачок инъекционный - 4 шт.;
 - Фиксатор катетера 8F - 1 шт.;
 - Инструкция по применению- 1 шт.
 - 4.2. Набор для катетеризации центральных вен Shunmei

- Introducer needle 18Ga - 1 pc.;
- Dilator 9F x 10 cm. - 1 pc.;
- Scalpel- 1 pc.;
- Syringe 5 ml. - 1 pc.;
- Injection cap - 4 pc.;
- Catheter clamp 8F - 1 pc.;
- 4.2. Central venous catheter kit Shunmei Quad lumen, diameter 8,5 Fr (2,83 mm.) length 20 cm. consists of:
 - Central venous catheter Quad lumen, diameter 8,5 Fr (2,83 mm) length 20 cm. - 1 pc.;
 - Guide wire 0,032 inch (0,81 mm.) x 60 cm. - 1 pc.;
 - Introducer needle 18Ga - 1 pc.;
 - Dilator 9F x 10 cm. - 1 pc.;
 - Scalpel- 1 pc.;
 - Syringe 5 ml. - 1 pc.;
 - Injection cap - 4 pc.;
 - Catheter clamp 8F - 1 pc.;
 - Instructions for use - 1 pc.
- 4.3. Central venous catheter kit Shunmei Quad lumen, diameter 8,5 Fr (2,83 mm.) length 30 cm. consists of:
 - Central venous catheter Quad lumen, diameter 8,5 Fr (2,83 mm) length 30 cm. - 1 pc.;
 - Guide wire 0,032 inch (0,81 mm.) x 60 cm. - 1 pc.;
 - Introducer needle 18Ga - 1 pc.;
 - Dilator 9F x 10 cm. - 1 pc.;
 - Scalpel- 1 pc.;
 - Syringe 5 ml. - 1 pc.;
 - Injection cap - 4 pc.;
 - Catheter clamp 8F - 1 pc.;

Instructions for use - 1 pc.

четырёхпросветный, диаметр 8,5 Fr (2,83 мм.) длина 20 см. в составе: — Катетер центральный венозный четырёхпросветный, диаметр 8,5 Fr (2,83 мм) длина 20 см. - 1 шт.; — Направитель проволоочный 0,032 дюйма (0,81 мм.) x 60 см. - 1 шт.; — Игла интродьюсерная 18Ga - 1 шт.; — Расширитель 9F x 10 см. - 1 шт.; — Скальпель - 1 шт.; — Шприц 5 мл. - 1 шт.; — Колпачок инъекционный - 4 шт.; — Фиксатор катетера 8F - 1 шт.; — Инструкция по применению- 1 шт. 4.3. Набор для катетеризации центральных вен Shunmei четырёхпросветный, диаметр 8,5 Fr (2,83 мм.) длина 30 см. в составе: — Катетер центральный венозный четырёхпросветный, диаметр 8,5 Fr (2,83 мм) длина 30 см. - 1 шт.; — Направитель проволоочный 0,032 дюйма (0,81 мм.) x 60 см. - 1 шт.; — Игла интродьюсерная 18Ga - 1 шт.; — Расширитель 9F x 10 см. - 1 шт.; — Скальпель - 1 шт.; — Шприц 5 мл. - 1 шт.; — Колпачок инъекционный - 4 шт.; — Фиксатор катетера 8F - 1 шт.; — Инструкция по применению- 1 шт.	
Назначение медицинского изделия	Purpose of the medical device
Набор для катетеризации центральных вен предназначен для обеспечения кратковременного доступа (не более 30 дней) к центральной венозной сосудистой системе для инфузии жидкостей, мониторинга центрального венозного давления и взятия проб крови.	The central venous catheter kit is intended for the purpose of providing short term access (no more than 30 days) to the central venous vascular system for the infusion of fluids, monitoring of central venous pressure and sampling of blood.
Показания	Indications

Показания не ограничиваются специфическими заболеваниями, пациенты, которым показано ставить набор для катетеризации центральных вен, в основном проходят лечение в отделении интенсивной терапии, обычно используемые пути прокола включают внутреннюю яремную вену, подключичную вену, бедренную вену, набор для катетеризации центральных вен используется для: — Парентерального питания, особенно у пациентов с хроническими заболеваниями. — Внутривенное введение антибиотиков — Химиотерапии — Измерения центрального венозного давления. (например, при трансплантации костного мозга) — Частые заборы крови — Обеспечение частого или постоянного внутривенного доступа — Необходимость внутривенной терапии при отсутствии периферического венозного доступа — Лекарственная терапия крови — Восстановление водного баланса — Мониторинг центрального венозного давления (ЦВД) у пациентов с острыми заболеваниями для количественной оценки баланса жидкости.	It's not limited to special disease, Patients that need having the CVC inserted are mostly treated at ICU, commonly used puncture pathways include the internal jugular vein, subclavian vein, femoral vein, CVC kit are used for: — Parenteral nutrition, especially in chronically ill persons. — Intravenous antibiotics. — Chemotherapy — Central venous pressure measuring. (such as at bone marrow transplantation) — Frequent blood draws — Frequent or persistent requirement for intravenous access — Need for intravenous therapy when peripheral venous access is impossible — Blood Medication — Rehydration — Monitoring of the central venous pressure (CVP) in acutely ill people to quantify fluid balance.
Противопоказания • Инфекция в месте прокола; • Значительная предрасположенность к кровотечению, такая как нарушение свертываемости крови и длительное антикоагулянтное лечение; • Стойкий шок; • Затрудненный или поврежденный канал прокола; • Аномалии или расслоения в месте пункции, такие как увеличенная щитовидная железа или другие опухоли; • Крайняя степень эмфиземы; • Беременность; Характерные отклонения в месте прокола, такие как ожоги и т.д.	Contraindications • Infection in the puncture site; • A serious bleeding tendency, such as coagulation disorder and the ongoing anti-coagulation treatment; • Persistent shock; • Impeded or injured puncture channel; • Abnormity at puncture or dissection site such as an enlarged thyroid or other tumors; • Critical condition of emphysema; • Pregnant; • Distinctive aberrance at puncture site, such as burns, etc.

Возможные осложнения и побочные эффекты	Possible complications and side effects
• Вторичная тампонада сердца в стенке сосуда; • Перфорация предсердий или желудочков; • Травмы плевры и средостения; • Воздушная эмболия, катетерная эмболия; • Разрыв грудного протока, бактериемия; • Септицемия, тромбоз; • Непреднамеренная артериальная пункция; • Повреждение нервов, образование гематом; • Кровотечение, дисритмия, гемоторакс; • Пневмоторакс; • Разрыв катетера; • Неправильное расположение катетера, окклюзия катетера; • Гидроторакс/плевральный выпот; • Хилоторакс; • Гемомедиастинум и гидромедиастинум.	• Cardiac tamponade secondary in vessel wall; • Atrial or ventricular perforation; • Pleural and mediastinal injuries; • Air embolism, catheter embolism; • Thoracic duct laceration, bacteremia; • Septicemia, thrombosis; • Inadvertent arterial puncture; • Nerve damage, hematoma formation; • Haemorrhage, dysrhythmia, hemothorax; • Pneumothorax; • Catheter rupture; • Catheter malposition, catheter occlusion; • Hydrothorax/pleural effusion; • Chylothorax; • Hemomediastinum and hydromediastinum.
Сведения о производителе	Information about manufacturer
Шунмей Медикал Ко., Лтд (Shunmei Medical Co., Ltd) R401 of building B, No. 8 of 1st Jinglong Road, Baolong Industrial Zone, LongGang District, 518116 Shenzhen, Guangdong, China. Tel: 0086-0752-3306949 Website: www.shunmed.com Email: nora@shunmed.com Производственная площадка: Шунмей Медикал Ко., Лтд (Shunmei Medical Co., Ltd) Yifa 3rd road, Yifa Industrial Zone, Pingtan Town, Huiyang District, Huizhou, Guangdong, China	Shunmei Medical Co., Ltd R401 of building B, No. 8 of 1st Jinglong Road, Baolong Industrial Zone, LongGang District, 518116 Shenzhen, Guangdong, China. Tel: 0086-0752-3306949 Website: www.shunmed.com Email: nora@shunmed.com Manufacturing site: Shunmei Medical Co., Ltd Yifa 3rd road, Yifa Industrial Zone, Pingtan Town, Huiyang District, Huizhou, Guangdong, China
Условия применения	Usage conditions

Общие: - Больница Условия использования: - Эксплуатация в чистых, светлых, стерильных условиях - В операционной	General: - Hospital Conditions of usage: - Operation in clean, bright, sterile environment - In operation room
Потенциальный потребитель	Potential consumer
Потенциальным потребителем является хирург с соответствующей компетенцией, прошедший подготовку для работы с центральным венозным катетером.	The Intended users are the competent surgeon who have the training of Central Venous Catheter management.
Требования безопасности и меры предосторожности	Warnings and precautions
Требования безопасности • Осложнения, вызванные использованием данного изделия, могут привести к серьезным травмам или смерти; наконечник катетера может повредить или пробить стенки сосудов. • Необходимо приложить все усилия для определения правильного положения наконечника, чтобы предотвратить эрозию или перфорацию центральной венозной системы, других сосудов и миокарда. Положение наконечника должно быть проверено рентгеном и регулярно контролироваться. Рентгеновский снимок бокового обзора может быть использован для оценки расположения наконечника относительно стенки сосуда. Положение наконечника должно быть показано параллельно стенке сосуда. • Во избежание повреждения сосудов не прилагайте чрезмерных усилий при продвижении расширителя. Используйте подходящий расширитель наименьшего размера. Направитель проволоочный всегда должен вести расширитель на несколько сантиметров. Не помещайте расширитель более чем на несколько сантиметров в сосуд. • Не пытайтесь продвигать или извлекать направитель проволоочный, катетер или другие компоненты через иглу	Warnings • Complications due to the use of this device can cause serious injury or death; catheter tip can erode or perforate vascular walls. • Every effort must be made to ascertain proper tip position to prevent erosion or perforation of central venous system, other vessels and myocardium. Tip position should be verified by x-ray and monitored routinely. Lateral view x-ray can be used to assess tip location in relation to vessel wall. Tip position should be shown to be parallel to vessel wall. • To avoid vascular injury, do not use excessive force when advancing dilators. Use the smallest size suitable dilator. Guide wire must always lead dilator by several centimeters. Do not insert dilator more than a few centimeters into the vessel. • Do not attempt to advance or withdraw guide wire, catheter, or other components through the introducer needle or dilator if resistance is felt. Continued advancement or retraction against resistance may result in major bleeding, vessel damage, serious injury to the patient, or damage to/breakage of the guide wire, catheter or other components. • Do not power inject fluids through catheter. Catheter rupture may happen.

интродьюсерную или расширитель, если ощущается сопротивление. Дальнейшее продвижение или извлечение против сопротивления может привести к сильному кровотечению, повреждению сосудов, серьезной травме пациента или повреждению / поломке направителя проволочного, катетера или других компонентов.

- Не прикладывайте чрезмерную силу при введении жидкостей через катетер. Может произойти разрыв катетера.
- Не используйте чистый этиловый спирт или другие органические растворители для промывки или пропитки катетера центрального венозного.
- Не используйте скальпель, иглы и другие острые предметы, имеющие возможность поцарапать катетер катетер.

Меры предосторожности

- Внимательно прочитайте инструкцию перед использованием. Соблюдайте все предупреждения и меры предосторожности, указанные в инструкции. Невыполнение этого требования может привести к осложнениям.
- Только хирурги, прошедшие соответствующую подготовку и знакомые с принципами, клиническими применениями, побочными эффектами и опасностями, могут использовать это изделие.
- Не видоизменяйте изделие.
- Не обрезайте направитель проволочный для изменения длины.
- Катетер не следует использовать для продолжительного (более 30 дней) применения.
- Изделие предназначено только для одноразового использования, не подлежит повторному использованию или повторной стерилизации.

- Do not use pure ethyl alcohol or other organic solvents to flush or soak the central venous catheter.
- Do not use scalpel, needle and other shapes scratched the catheter.


Precautions

- Carefully read all instructions prior to use. Observe all warnings and precautions noted throughout these instructions. Failure to do so may result in complications.
- Only surgeons who have received appropriate training and are familiar with the principles, clinical applications, side effects and hazards should use this device.
- Do not alter this device.
- Do not cut the guide wire to alter the length.
- Catheter should not be used for long-term (more than 30 days) applications.
- The device is designed for single use only, do not reuse or re-sterilize.
- If lumen flow is impeded, do not force injection or withdrawal of fluids. Notify competent attending surgeon immediately.
- Select puncture site and required length of catheter by assessing patient anatomy and condition.
- Patient movement can displace catheter tip. Use should be limited to properly controlled hospital environment.
- The device is operated under sterile environment.
- Do not use this device after expiry date printed on the label.
- Do not use this device if the package is damaged.
- After use, dispose the device according to hospital, administrative or government policies.

- Если просвет потока затруднен, не прикладывайте силу при инъекции или заборе жидкостей. Немедленно сообщите об этом компетентному лечащему хирургу.
- Выберите место прокола и необходимую длину катетера центрального венозного, оценив анатомию и состояние пациента.
- Движение пациента может сместить наконечник катетера. Использование должно быть ограничено надлежащим образом контролируемой больничной средой.
- Устройство эксплуатируется в стерильных условиях.
- Не используйте данное устройство после истечения срока годности, указанного на маркировке.
- Не используйте это изделие, если упаковка повреждена.
- После использования утилизируйте устройство в соответствии с правилами больницы, администрации или политикой государства.

Изображение и описание изделия

Набор для катетеризации центральных вен Shunmei - это разновидность внутрисосудистого катетера. Набор для катетеризации центральных вен Shunmei состоит из:

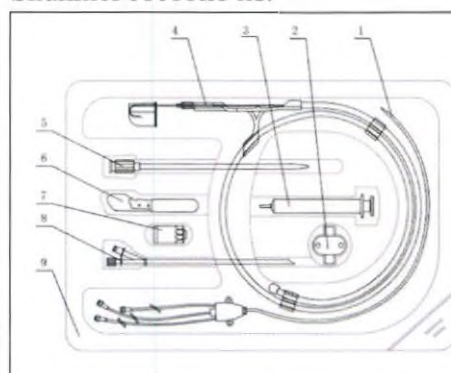


1. Катетер центральный венозный
2. Фиксатор катетера
3. Шприц
4. Направитель проволоочный
5. Расширитель
6. Скальпель
7. Колпачок инъекционный
8. Игла интродьюсерная
9. Пластиковый лоток

Для изделия адаптирована методика Селдингера для катетеризации. Игла интродьюсерная будет использоваться для введения в сосуд, а

Picture and description of device

Central Venous Catheter is a kind of intravascular catheter. The CVC Kit is composed of:

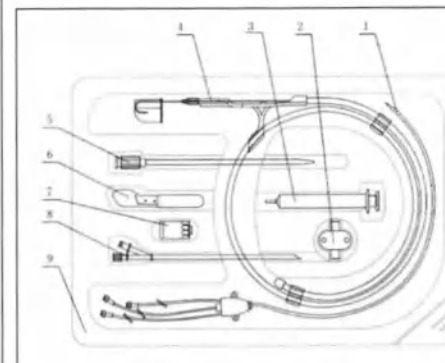

1. Central venous catheter
2. Catheter clamp
3. Syringe
4. Guide wire
5. Dilator
6. Scalpel
7. Injection cap
8. Y introducer needle or straight introducer needle
9. Plastic tray

The device is adopted Seldinger technique for catheterization. Introducer needle will be used to insert into targeted vessel and then a guidewire will go into the targeted place along the introducer

затем Направитель проволочный вводят в выбранное место вдоль иглы интродьюсерной. После этого Игла интродьюсерная извлекается, и для расширения сосуда можно использовать расширитель, чтобы обеспечить удобство для введения Катетера центрального венозного по Направителю проволочному. После катетеризации катетера центрального венозного Направитель проволочный будет удален, и катетер центральный венозный будет зафиксирован для проведения соответствующего лечения.

Функция каждого компонента:

- 1) Катетер центральный венозный (ЦВК): Катетер центральный венозный предназначен для обеспечения краткосрочного доступа (не более 30 дней) к центральной венозной сосудистой системе для вливания жидкостей, мониторинга центрального венозного давления и отбора проб крови.
- 2) Направитель проволочный: Направитель проволочный используется для направления катетера центрального венозного через венозную систему к ожидаемому месту установки катетера. Диаметр составляет от 0,30 до 0,97 мм. Длина составляет от 20 см до 120 см.
- 3) Расширитель: Расширитель используется для увеличения пути введения катетера. Размер от 4 до 9 F и длина от 6 см до 10 см.
- 4) Игла интродьюсерная: Игла интродьюсерная используется для входа и туннелирования в кожу и сосудистую систему с целью размещения катетера. Размер составляет от 18 до 21 Га. Длина составляет от 3,8 см до 7,0 см с допуском $\pm 0,1$ см.
- 5) Скальпель: Скальпель используется для дальнейшего расширения места прокола, когда это необходимо.
- 6) Фиксатор катетера: Фиксатор катетера является устройством вторичной фиксации, когда это необходимо. Является средством дополнительной фиксации, не единственной. Чтобы обеспечить фиксацию, наложите швы на каждый глаз, пустив по крыльям катетерный зажим.
- 7) Колпачок инъекционный: Колпачок инъекционный используется для герметизации разъема центрального венозного катетера, который используется для обмена жидкости.

needle. After that introducer needle is withdrawn and a dilator may be used to dilate the vessel so as to bring convenience for CVC insertion along the guide wire. After catheterization of CVC, the guide wire will be withdrawn and CVC will be fixed to conduct relevant treatment.

Function of each component:

- 1) Central Venous Catheter (CVC): The Central Venous Catheter is intended for the purpose of providing short term access (no more than 30 days) to the central venous vascular system for the infusion of fluids, monitoring of central venous pressure and sampling of blood.
- 2) Guidewires: The guidewire is used for guiding the catheter through the venous system to the desired catheter placement location. The diameter is from 0.30 to 0.97 mm. The Length is from 20 cm to 120 cm.
- 3) Dilator: Dilator is used to enlarge the introducer path of the catheter. The size is from 4 to 9 French and length from 6 cm to 10 cm.
- 4) Introducer needle: The introducer needle is used for entrance and tunneling in to the skin and vascular system for the purpose of catheter placement. The size is from 18 to 21 Ga. The length is from 3.8 cm to 7.0 cm with a tolerance of ± 0.1 cm.
- 5) Scalpel: The scalpel is used for further enlargement of puncture site, when necessary.
- 6) Catheter clamp: The catheter clamp is secondary fixation device for catheter fixation, when necessary. It is an additional support and not the only means. To ensure fixation, suture at each eye let on the wings of catheter clamp.
- 7) Injection cap : The injection cap is used for sealing the Central Venous Catheter connector which is used for liquid exchange.
- 8) Syringe: A 5 ml Syringe is used as accessory equipment for flushing, injection etc

8) Шприц: Шприц объемом 5 мл используется в качестве вспомогательного оборудования для промывки, инъекций и т. д.	
Подготовка к использованию 1. Выберите размер изделия, извлеките изделие из упаковки и убедитесь, что все компоненты являются целыми и неповрежденными перед использованием. 2. Промойте просветы катетера центрального венозного и расширителя физиологическим раствором, убедитесь, что расширитель, соединяющий дистальный просвет, должен быть открыт для прохождения проволоки. 3. Используйте асептическую методику и применяйте местную анестезию, также закройте место введения хирургической салфеткой по мере необходимости.	Preparation for use 1. Chose appropriate model device, Remove the device from package and ensure that all components are integral and unbroken before use. 2. Flush the catheter lumens and the dilator with saline, make sure that the dilator connecting the distal lumen should be open for the purpose of thread through. 3. Use aseptic technique and adopt local anesthesia to prepare and drape the insertion site as required.
Способ применения 1. Сделайте прокол выбранной вены иглой интродьюсерной. 2. После успешной пункции используйте устройство для продвижения направителя проволочного, чтобы продвинуть направитель проволочный через иглу интродьюсерную в вену. Во время продвижения направляющего провода не должно ощущаться никакого сопротивления, если кончик иглы интродьюсера правильно входит в вену. В противном случае кончик иглы интродьюсера находится в сосудистой периферической ткани или стенке сосуда. В это время ощущаемое сопротивление станет больше из-за продвижения направляющего провода. J-образный наконечник направляющей проволоки может помочь избежать перфорации раны. В этом состоянии, пожалуйста, удерживайте иглу вводителем, чтобы мягко вынуть направляющий провод наружу. Внимание: Если Направитель проволочный плотно скручен, его нельзя извлечь из иглы интродьюсерной, в этом случае, пожалуйста, вытяните их вместе, замените и выберите новое место прокола	Mode of application 1. Puncture the intended vein by the introducer needle. 2. After successful puncture, use the guide wire advancer to advance the guide wire through the introducer needle into vein. During advancing guide wire, no resistance should be felt if the tip of introducer needle correctly goes into the vein. Otherwise, the tip of introducer needle is in the vascular peripheral tissue or the vessel wall. At this time, the resistance felt will become larger due to the advance of the guide wire. The J-shape tip of the guide wire can help avoid perforating wound. In this condition, please hold the introducer needle to softly withdraw the guide wire toward outside. Caution: If the guide wire is tightly twisted, it cannot be pulled back solely from the introducer needle, in this case, please draw them out together, and replace and choose new puncture site for CVC insertion. 3. After the guide wire tip has gone into the vessel to the required depth, hold guide wire in place and remove the

для введения катетер ацентрального венозного.

3. После того, как наконечник Направителя проволоочного вошел в сосуд на требуемую глубину, удерживайте направитель на месте и извлеките иглу интродьюсерную.
4. Вставьте расширитель от его наконечника в сосуд вдоль направителя проволоочного, затем мягко поверните его, чтобы увеличить сосуд для легкого доступа к катетеру, затем извлеките его.

Внимание: Не оставляйте расширитель на месте дольше, чем необходимо, в случае перфорации стенки сосуда.

5. Вставьте катетер центральный венозный, начиная с синего наконечника, пройдите через направитель проволоочный, когда синий наконечник коснется кожи, удерживайте катетер центральный венозный, затем мягко поверните и продвиньте его.
6. Проверьте отметку "см" на катетер центральном венозном в качестве ориентира для позиционирования, переместите катетер центральный венозный в положение наконечника и запишите его длину. Удерживайте катетер центральный венозный, чтобы извлечь направитель проволоочный, если катетер центральный венозный достиг необходимой глубины.

Внимание: Хотя вероятность разрыва направителя проволоочного очень мала, пользователь должен понимать, что перенапряжение может привести к разрыву при растяжении. Специально разработанный направитель проволоочный должен быть гладким внутри и снаружи, если при его оттягивании ощущается сопротивление, он может закрутиться в начале катетера центрального венозного, в этом случае перенапряжение может привести к разрыву при растяжении. Поэтому, пожалуйста, отодвиньте катетер центральный венозный на 2-3 сантиметра, сохраняя направитель проволоочный в исходном положении. Затем

introducer needle.

4. Insert the dilator from its tip into the vessel along the guide wire, then rotate it softly to enlarge the vessel for easy access of catheter, then remove it.

Caution: Do not let the dilator in the place for longer than necessary in case of the perforation of vessel wall.

5. Insert the central venous catheter, starting from the blue tip, go through the guide wire, when the blue tip touches skin, hold the catheter, then softly rotate and advance it.
6. Check the "cm" mark on the catheter as positioning reference, advance the catheter to the central venous tip position and record its length. Hold the catheter to withdraw the guide wire if the catheter has reached the required depth.

Caution: Although the possibility of breaking guide wire is very small, operator must understand that overexertion may cause tensile failure. The specially designed guide wire should be smooth

in and out, if resistance is felt when drawing it back, it may twist in the head of catheter, in this case, overexertion may result in tensile failure. So please draw back the catheter for 2 or 3 centimeters while keeping guide wire in its original position. Then withdraw the guide wire only. If there is still resistance, please withdraw both the catheter and guide wire out together.

7. After extracting guide wire, check its integrity.
8. Use syringe to connect the catheter hub and draw back and push the syringe piston for inspecting that the flow rate of central venous catheter is normal and there is no barrier.
9. Then remove the syringe and connect proper injection cap selected with catheter hub.
10. If necessary, please use X-ray to determine position the catheter.
11. Suture the catheter clamp to fix the catheter on patient's body.

Caution: do not suture directly on the peripheral part of catheter

извлеките только направлятель проволоочный. Если сопротивление все еще есть, пожалуйста, извлеките катетер центральный венозный и направлятель проволоочный вместе. - После извлечения направлятеля проволоочного проверьте его целостность. - С помощью шприца подсоедините павильон катетера центрального венозного, отодвиньте и надавите на поршень шприца, чтобы убедиться, что скорость потока катетера центрального венозного нормальная и нет никаких препятствий. - Затем извлеките шприц и соедините соответствующий колпачок инъекционный, выбранный в соответствии с павильоном катетера центрального венозного. - При необходимости, пожалуйста, используйте рентген, чтобы определить положение катетера центрального венозного. - Пришейте фиксатор катетера, чтобы закрепить катетер центральный венозный на теле пациента. Внимание: не накладывайте швы непосредственно на периферическую часть катетера в случае его разрезания и разрыва. - Убедитесь, что набор для катеризации центральных вен Shunmei не остается в теле пациента более 30 дней. - После использования утилизируйте изделие в соответствии с правилами больницы, администрации или правительства.	in case of cutting and breaking it. - Make sure the central venous catheter kit does not stay in patient's body for more than 30 days. - After use, dispose the device according to hospital, administrative or government policies.
Информация об очистке, дезинфекции и стерилизации медицинского изделия (для стерилизуемых изделий), порядке действий при нарушении стерильной упаковки (для изделий, поставляемых в стерильном виде)	Information on cleaning, disinfection and sterilization of a medical device (for sterilized products), the procedure in case of package appears damaged (for sterilize products)
Изделие предназначено только для одноразового использования и не может использоваться повторно.	The device is only for single-use and can not be recycled or reused.
Техническое обслуживание	Maintenance
Неприменимо. Изделие не требует технического обслуживания.	Not applicable. The product does not require maintenance.

Основные технические и функциональные характеристики

Main technical and functional characteristics

Table 1 Main technical and functional characteristics of Single Lumen CVC

Item	Effective length, cm	Outside diameter, mm	Inner diameter, mm	Distance marking	Peak tensile strength, N	Flow Rate, ml/min	Leak test
20 Ga x 5 cm x 0,9 mm; 609118	5 ± 0,5	0,96±0,20	0,58	The distance marks is 1 cm apart on the portion of the catheter,	5	15	not leak
20 Ga x 8 cm x 0,9 mm; 609119	8 ± 0,5	0,96±0,20	0,58		5	11	
20 Ga x 13 cm x 0,9 mm; 609111	13 ± 0,5	0,96±0,20	0,58		5	8	
20 Ga x 15 cm x 0,9 mm; 609112	15 ± 0,5	0,96±0,20	0,58		5	7	
20 Ga x 16 cm x 0,9 mm; 609117	16± 0,5	0,96±0,20	0,58		5	7	
20 Ga x 20 cm x 0,9 mm; 609113	20 ± 0,5	0,96±0,20	0,58		5	6	
18 Ga x 12 cm x 1,2 mm; 609110	12 ± 0,5	1,35±0,20	0,7		10	27	
18 Ga x 13 cm x	13 ± 0,5	1,35±0,20	0,7		10	26	

	1,2 mm; 609107								
	18 Ga x 15 cm x 1,2 mm; 609108	15 ± 0,5	1,35±0,20	0,7		10	24		
	18 Ga x 16 cm x 1,2 mm; 609116	16 ± 0,5	1,35±0,20	0,7		10	23		
	18 Ga x 20 cm x 1,2 mm; 609109	20 ± 0,5	1,35±0,20	0,7		10	18		
	16 Ga x 15 cm x 1,6 mm; 609104	15 ± 0,5	1,70±0,20	1,1		10	85		
	16 Ga x 16 cm x 1,6 20mm; 609115	16 ± 0,5	1,70±0,20	1,1		10	83		
	16 Ga x 20 cm x 1,6 mm; 609105	20 ± 0,5	1,70±0,20	1,1		10	73		
	16 Ga x 30 cm x 1,6 mm; 609106	30 ± 0,5	1,70±0,20	1,1		10	60		
	14 Ga x 15 cm x 2,1 mm; 609101	15 ± 0,5	2,10±0,20	1,35		15	140		
	14 Ga x 16 cm x	16 ± 0,5	2,10±0,20	1,35		15	138		

2,1 mm; 609114							
14 Ga x 20 cm x 2,1 mm; 609102	20 ± 0,5	2,10±0,20	1,35		15	120	
14 Ga x 30 cm x 2,1 mm; 609103	30 ± 0,5	2,10±0,20	1,35		15	110	

Table 2 Main technical and functional characteristics of Double Lumen CVC

Item	Effective length, cm	Outside diameter, mm	Inner diameter, mm	Distance marking position	Force at break, N	Flow Rate, ml/min		Leak test
						Distal	Proximal	
4Fr x 5 cm x 1,33 mm; 609218	5 ± 0,5	1,33±0,10	0,53	The distance marks is 1 cm apart on the portion of the catheter,	10	24	13	not leak
4 Fr x 8 cm x 1,33 mm; 609219	8 ± 0,5	1,33±0,10	0,53		10	18	10	
4 Fr x 13 cm x 1,33 mm; 609220	13 ± 0,5	1,33±0,10	0,53		10	12	7	
5 Fr x 8 cm x 1,67 mm; 609201	8 ± 0,5	1,67±0,10	0,66		10	25	13	
5 Fr x 10 cm x 1,67 mm; 609215	10 ± 0,5	1,67±0,10	0,66		10	21	11	
5 Fr x 13 cm x 1,67 mm; 609202	13 ± 0,5	1,67±0,10	0,66		10	18	10	
5 Fr x 15 cm x 1,67 mm;	15 ± 0,5	1,67±0,10	0,66		10	17	10	

	length, cm	diameter, mm	diameter, mm	marking position	at break, N	Distal	Proximal	Middle	
5 Fr x 13 cm x 1,67 mm; 609315	13 ± 0,5	1,67 ± 0,10	0,4	The distance marks is 1 cm apart on the portion of the catheter,	10	40	7	7	not leak
5,5 Fr x 8 cm x 1,83 mm; 609301	8 ± 0,5	1,83 ± 0,10	0,4		10	58	10	11	
5,5 Fr x 13 cm x 1,83 mm; 609302	13 ± 0,5	1,83 ± 0,10	0,4		10	50	8	8	
5,5 Fr x 15 cm x 1,83 mm; 609303	15 ± 0,5	1,83 ± 0,10	0,4		10	45	7	7	
5,5 Fr x 16 cm x 1,83 mm; 609309	16 ± 0,5	1,83 ± 0,10	0,4		10	42	7	7	
5,5 Fr x 20 cm x 1,83 mm; 609313	20 ± 0,5	1,83 ± 0,10	0,4		10	37	6	6	
7 Fr x 15 cm x 2,33 mm;	15 ± 0,5	2,33 ± 0,10	1,05		15	67	40	36	

	609304												
	7 Fr x 16 cm x 2,33 mm; 609310	16 ± 0,5	2,33±0,10	1,05		15	65	38	35				
	7 Fr x 18 cm x 2,33 mm; 609314	18 ± 0,5	2,33±0,10	1,05		15	60	36	32				
	7 Fr x 20 cm x 2,33 mm; 609305	20 ± 0,5	2,33±0,10	1,05		15	56	31	28				
	7 Fr x 30 cm x 2,33 mm; 609306	30 ± 0,5	2,33±0,10	1,05		15	54	23	22				
	8 Fr x 20 cm x 2,67 mm; 609316	20 ± 0,5	2,66±0,10	1,3		15	105	34	34				
	8,5 Fr x 15 cm x 2,83 mm; 609312	15 ± 0,5	2,83±0,10	1,3		15	130	43	43				
	8,5 Fr x 16 cm x 2,83 mm; 609311	16 ± 0,5	2,83±0,10	1,3		15	130	42	42				
	8,5 Fr x	20 ± 0,5	2,83±0,10	1,3		15	115	36	36				

20 cm x 2,83 mm; 609307									
8,5 Fr x 30 cm x 2,83 mm; 609308	30 ± 0,5	2,83±0,10	1,3		15	110	27	27	

Table 4 Main technical and functional characteristics of (Quad Lumen CVC)

Item	Effective length, cm	Outside diameter, mm	Inner diameter, mm	Distance marking position	Force at break, N	Flow Rate, ml/min				Leak test
						Distal	Proximal	Middle 1	Middle 2	
8,5 Fr x 15 cm x 2,83 mm; 609401	15 ± 0,5	2,83±0,10	1,2	The distance marks is 1 cm apart on the portion of the catheter,	15	60	35	90	35	not leak
8,5 Fr x 20 cm x 2,83 mm; 609402	20 ± 0,5	2,83±0,10	1,2		15	58	30	80	30	
8,5 Fr x 30 cm x 2,83 mm; 609403	30 ± 0,5	2,83±0,10	1,2		15	46	23	70	22	

Table 5 Main technical and functional characteristics of Introducer

	Effective length	Outside diameter	Inner diameter	Conical Fitting for Needle Hub	Force at break, N	Strength of union of needle
--	------------------	------------------	----------------	--------------------------------	-------------------	-----------------------------

							tube/hub
18G	78± 1 mm	1,28± 0,01 mm	1,04± 0,01 mm	Female 6% Luer taper conical fitting	20N	20N	
20G	45± 1 mm	0,90± 0,01 mm	0,56± 0,01 mm	Female 6% Luer taper conical fitting	20N	20N	
21G	45± 1 mm	0,81± 0,01 mm	0,49± 0,01 mm	Female 6% Luer taper conical fitting	20N	20N	

Table 6 Main technical and functional characteristics of Guide Wire

	Effective length	Outside diameter	Fracture Test	Flexing Test	Tensile Test, N
0,018×45 cm	45 cm	0,46 mm (0,018")	Tested accordance to the method given in Annex E of EN ISO 11070:2014, The guidewire shall not fracture, loosen, or fail in such a manner that a) any section is left free to stretch, b) A sharp, or potentially traumatic fracture surface is exposed, or c) Any part of the device becomes separated such that it would not be removable by withdrawing the device from use,	Tested in accordance with Annex G in EN ISO 11070:2014, the guidewire shall not fracture, loosen, or fail in such a manner that a) any section of coil is left free to stretch, b) A sharp, or potentially traumatic fracture surface is exposed, or c) Any part of the device becomes separated such that it would not be removable by withdrawing the device from use,	5
0,021×45 cm	45 cm	0,53 mm (0,021")			5
0,032×60 cm	60 cm	0,81 mm (0,032")			10

Table 7 Main technical and functional characteristics of Dilator

	Effective length	Outside diameter	Inner diameter	Conical Fitting	Strength of union of hub and dilator
4F×6cm	6±0,5	1,40±0,1	0,75±0,2	Female 6% Luer taper conical fitting	10
5F×7cm	7±0,5	1,70±0,1	1,00±0,2	Female 6% Luer taper conical fitting	10

6F×8cm	8±0,5	2,00±0,1	1,00±0,2	Female 6% Luer taper conical fitting	15
8F×10cm	10±0,5	2,70±0,1	1,10±0,2	Female 6% Luer taper conical fitting	15
9F×10cm	10±0,5	3,00±0,1	1,10±0,2	Female 6% Luer taper conical fitting	15

Table 8 Main technical and functional characteristics of Scalpel

Effective length	Length of blade	Breadth of blade	Hardness
16,5mm±0,2mm	43 mm ± 0,5 mm	6,5mm±0,2mm	≥650HV ₁₀

Table 9 Main technical and functional characteristics of Catheter clamp

Length of inner housing	Length of outer housing	Outside diameter of inner housing	Inner diameter of inner housing	Diameter of outer housing
2,2 mm±0,1 mm	1,8 mm±0,1 mm	4,5 mm±0,1 mm	2,4 mm±0,1 mm	4,8 mm±0,1 mm

Таблица 1 Основные технические и функциональные характеристики Катетера центрального венозного однопросветного

Изделие	Эффективная длина, см	Наружный диаметр, мм	Внутренний диаметр, мм	Разметка расстояния	Усилие на разрыв, Н	Скорость потока, мл/мин	Утечка
20 Ga x 5 см x 0,9 мм; 609118	5 ± 0,5	0,96±0,20	0,58	Расстояние между отметками равно 1 см	5	15	утечки не обнаружено
20 Ga x 8 см x 0,9 мм; 609119	8 ± 0,5	0,96±0,20	0,58		5	11	
20 Ga x 13 см x 0,9 мм; 609111	13 ± 0,5	0,96±0,20	0,58		5	8	
20 Ga x 15 см x	15 ± 0,5	0,96±0,20	0,58		5	7	

	0,9 мм; 609112								
	20 Га x 16 см x 0,9 мм; 609117	16 ± 0,5	0,96±0,20	0,58		5	7		
	20 Га x 20 см x 0,9 мм; 609113	20 ± 0,5	0,96±0,20	0,58		5	6		
	18 Га x 12 см x 1,2 мм; 609110	12 ± 0,5	1,35±0,20	0,7		10	27		
	18 Га x 13 см x 1,2 мм; 609107	13 ± 0,5	1,35±0,20	0,7		10	26		
	18 Га x 15 см x 1,2 мм; 609108	15 ± 0,5	1,35±0,20	0,7		10	24		
	18 Га x 16 см x 1,2 мм; 609116	16 ± 0,5	1,35±0,20	0,7		10	23		
	18 Га x 20 см x 1,2 мм; 609109	20 ± 0,5	1,35±0,20	0,7		10	18		
	16 Га x 15 см x 1,6 мм; 609104	15 ± 0,5	1,70±0,20	1,1		10	85		
	16 Га x 16 см x 1,6	16 ± 0,5	1,70±0,20	1,1		10	83		

20мм; 609115								
16 Ga x 20 см x 1,6 мм; 609105	20 ± 0,5	1,70±0,20	1,1		10	73		
16 Ga x 30 см x 1,6 мм; 609106	30 ± 0,5	1,70±0,20	1,1		10	60		
14 Ga x 15 см x 2,1 мм; 609101	15 ± 0,5	2,10±0,20	1,35		15	140		
14 Ga x 16 см x 2,1 мм; 609114	16 ± 0,5	2,10±0,20	1,35		15	138		
14 Ga x 20 см x 2,1 мм; 609102	20 ± 0,5	2,10±0,20	1,35		15	120		
14 Ga x 30 см x 2,1 мм; 609103	30 ± 0,5	2,10±0,20	1,35		15	110		

Таблица 2 Основные технические и функциональные характеристики Катетера центрального венозного двухпросветного

Изделие	Эффективная длина, см	Наружный диаметр, мм	Внутренний диаметр, мм	Разметка расстояния	Усилие на разрыв, Н	Скорость потока, мл/мин		Утечка
						Дистальный	Проксимальный	
4Fr x 5 см x 1,33 мм; 609218	5 ± 0,5	1,33±0,10	0,53	Расстояние между отметками равно 1 см	10	24	13	Утечки не обнару жено

4 Fr x 8 см x 1,33 мм; 609219	8 ± 0,5	1,33±0,10	0,53	10	18	10
4 Fr x 13 см x 1,33 мм; 609220	13 ± 0,5	1,33±0,10	0,53	10	12	7
5 Fr x 8 см x 1,67 мм; 609201	8 ± 0,5	1,67±0,10	0,66	10	25	13
5 Fr x 10 см x 1,67 мм; 609215	10 ± 0,5	1,67±0,10	0,66	10	21	11
5 Fr x 13 см x 1,67 мм; 609202	13 ± 0,5	1,67±0,10	0,66	10	18	10
5 Fr x 15 см x 1,67 мм; 609213	15 ± 0,5	1,67±0,10	0,66	10	17	10
5 Fr x 16 см x 1,67 мм; 609210	16 ± 0,5	1,67±0,10	0,66	10	16	9
5 Fr x 20 см x 1,67 мм; 609203	20 ± 0,5	1,67±0,10	0,66	10	13	7
7 Fr x 15 см x 2,33 мм; 609204	15 ± 0,5	2,33±0,10	1,15	15	100	55
7 Fr x	16 ± 0,5	2,33±0,10	1,15	15	98	53

16 см x 2,33 мм; 609211										
7 Fr x 18 см x 2,33 мм; 609221	18 ± 0,5	2,33±0,10	1,15			15	93	48		
7 Fr x 20 см x 2,33 мм; 609205	20 ± 0,5	2,33±0,10	1,15			15	85	45		
7 Fr x 30 см x 2,33 мм; 609206	30 ± 0,5	2,33±0,10	1,15			15	65	30		
8 Fr x 15 см x 2,66 мм; 609214	15 ± 0,5	2,66±0,10	1,2			15	110	98		
8 Fr x 16 см x 2,66 мм; 609212	16 ± 0,5	2,66±0,10	1,2			15	108	97		
8 Fr x 20 см x 2,66 мм; 609207	20 ± 0,5	2,66±0,10	1,2			15	105	85		
8 Fr x 30 см x 2,66 мм; 609209	30 ± 0,5	2,66±0,10	1,2			15	90	65		

Таблица 3 Основные технические и функциональные характеристики Катетера центрального венозного трехпросветного

Изделие	Эффективная длина, см	Наружный диаметр, мм	Внутренний диаметр, мм	Разметка расстояния	Усилие на разрыв, Н	Скорость потока, мл/мин			Утечка
						Дистальный	Проксимальный	Средний	
5 Fr x 13 см x 1,67 мм; 609315	13 ± 0,5	1,67±0,10	0,4	между отметками	10	40	7	7	е о о н

5,5 Fr x 8 см x 1,83 мм; 609301	8 ± 0,5	1,83±0,10	0,4		10	58	10	11	
5,5 Fr x 13 см x 1,83 мм; 609302	13 ± 0,5	1,83±0,10	0,4		10	50	8	8	
5,5 Fr x 15 см x 1,83 мм; 609303	15 ± 0,5	1,83±0,10	0,4		10	45	7	7	
5,5 Fr x 16 см x 1,83 мм; 609309	16 ± 0,5	1,83±0,10	0,4		10	42	7	7	
5,5 Fr x 20 см x 1,83 мм; 609313	20 ± 0,5	1,83±0,10	0,4		10	37	6	6	
7 Fr x 15 см x 2,33 мм; 609304	15 ± 0,5	2,33±0,10	1,05		15	67	40	36	
7 Fr x 16 см x 2,33 мм; 609310	16 ± 0,5	2,33±0,10	1,05		15	65	38	35	
7 Fr x 18 см x 2,33 мм; 609314	18 ± 0,5	2,33±0,10	1,05		15	60	36	32	
7 Fr x 20 см x 2,33 мм; 609305	20 ± 0,5	2,33±0,10	1,05		15	56	31	28	
7 Fr x 30 см x 2,33 мм; 609306	30 ± 0,5	2,33±0,10	1,05		15	54	23	22	
8 Fr x 20 см x 2,67 мм; 609316	20 ± 0,5	2,66±0,10	1,3		15	105	34	34	
8,5 Fr x 15 см x 2,83 мм; 609312	15 ± 0,5	2,83±0,10	1,3		15	130	43	43	
8,5 Fr x 16 см x 2,83 мм; 609311	16 ± 0,5	2,83±0,10	1,3		15	130	42	42	
8,5 Fr x 20 см x 2,83 мм; 609307	20 ± 0,5	2,83±0,10	1,3		15	115	36	36	
8,5 Fr x 30 см x 2,83 мм; 609308	30 ± 0,5	2,83±0,10	1,3		15	110	27	27	

Таблица 4 Основные технические и функциональные характеристики Катетера центрального венозного четырехпросветного

Изделие	Эффективная длина, см	Наружный диаметр, мм	Внутренний диаметр, мм	Разметка расстояния	Усилие на разрыв, Н	Скорость потока, мл/мин п				Утечка
						Дистальный	Проксимальный	Средний 1	Средний 2	
8,5 Fr x 15 см x 2,83 мм; 609401	15 ± 0,5	2,83±0,10	1,2	Расстояние между отметками равно 1 см	15	60	35	90	35	утечки не обнаружено
8,5 Fr x 20 см x 2,83 мм;	20 ± 0,5	2,83±0,10	1,2		15	58	30	80	30	

609402											
8,5 Fr x 30 см x 2,83 мм; 609403	30 ± 0,5	2,83±0,10	1,2		15	46	23	70	22		

Таблица 5 Основные технические и функциональные характеристики Интродьюсера

	Эффективная длина	Внешний диаметр	Внутренний диаметр	Конусность соединения павильона	Усилие на разрыв, Н	Прочность соединения трубки иглы и соединительной штулки иглы, Н
18G	78± 1 мм	1,28± 0,01 мм	1,04± 0,01 мм	Женский 6%-ный конус Люэра	69	
20G	45± 1 мм	0,90± 0,01 мм	0,56± 0,01 мм	Женский 6%-ный конус Люэра	54	
21G	45± 1 мм	0,81± 0,01 мм	0,49± 0,01 мм	Женский 6%-ный конус Люэра	44	

Таблица 6 Основные технические и функциональные характеристики Направителя проволочного

	Эффективная длина	Внешний диаметр	Испытание на излом	Испытание на изгиб	Усилие на разрыв, Н
0,018×45 см	45 см	0,46 мм (0,018")	Испытано в соответствии с методом, приведенным в Приложении Е к EN ISO 11070:2014, Направляющая проволока не должна ломаться, ослабляться или выходить из строя таким образом, чтобы а) любое действие остается свободным для растяжения,	Испытанный в соответствии с Приложением G в EN ISO 11070: 2014, проводник не должен разрушаться, ослабляться или выходить из строя таким образом, чтобы а) любая секция катушки оставалась свободной для растяжения, б) Имеется острая или	5
0,021×45 см	45 см	0,53 мм (0,021")			5
0,032×60 см	60 см	0,81 мм (0,032")			10

			б) Имеется острая или потенциально травмирующая поверхность перелома, или с) Любая часть устройства становится отделенной таким образом, чтобы ее нельзя было удалить, отключив устройство от использования,	потенциально травмирующая поверхность перелома, или с) Любая часть устройства становится отдельной, так что ее нельзя будет восстановить, отключив устройство от использования,	
--	--	--	---	--	--

Таблица 7 Основные технические и функциональные характеристики Расширителя

	Эффективная длина	Внешний диаметр	Внутренний диаметр	Конусность соединения	Прочность соединения павильона и расширителя
4F×6 см	6±0,5	1,40±0,1	0,75±0,2	Женский 6%-ный конус Люэра	10
5F×7 см	7±0,5	1,70±0,1	1,00±0,2	Женский 6%-ный конус Люэра	10
6F×8 см	8±0,5	2,00±0,1	1,00±0,2	Женский 6%-ный конус Люэра	15
8F×10 см	10±0,5	2,70±0,1	1,10±0,2	Женский 6%-ный конус Люэра	15
9F×10 см	10±0,5	3,00±0,1	1,10±0,2	Женский 6%-ный конус Люэра	15

Таблица 8 Основные технические и функциональные характеристики Скальпеля

Эффективная длина	Длина лезвия	Ширина лезвия	Жесткость
16,5 мм ± 0,2 мм	43 мм ± 0,5 мм	6,5 мм ± 0,2 мм	≥650HV ₁₀

Таблица 9 Основные технические и функциональные характеристики Фиксатора катетера

Длина внутренней полости	Длина внешней полости	Внешний диаметр внутренней полости	Внутренний диаметр внутренней полости	Диаметр внешней полости
2,2 мм ± 0,1 мм	1,8 мм ± 0,1 мм	4,5 мм ± 0,1 мм	2,4 мм ± 0,1 мм	4,8 мм ± 0,1 мм

Описание принадлежностей, медицинских изделий или изделий, не являющихся медицинскими, но предусмотренных для использования в комбинации с заявленным медицинским изделием	Key accessories, medical devices or non-medical devices, to be used in combination with medical device submitted for registration
Неприменимо.	Non applicable.

Сведения о лекарственных средствах входящих в состав медицинского изделия	Information about the medicines included in the medical device								
Наборы для катеризации центральных вен Shunmei не содержат фармацевтических субстанций или вредных химических веществ.	CVC Kit doesn't incorporate Pharmaceutical substances or Harm-ful Chemical Substance.								
Сведения о материалах животного/человеческого происхождения	Information about materials of animal/human origin								
Наборы для катеризации центральных вен Shunmei не содержат жизнеспособных компонентов из тканей животных или тканей и/или производных крови человеческого происхождения.	CVC Kit doesn't incorporate viable materials of animal tissue or tissues and/or blood derivatives of human origin.								
Условия эксплуатации медицинского изделия <i>Медицинское изделие предназначено для эксплуатации во внутренней среде организма, диапазон температур от 32°C до 42 °C.</i>	Operating conditions of the medical device Medical devices, that are intended to be used in the body's internal environment, are used in temperature range from 32°C to 42°C.								
Условия транспортировки и хранения медицинского изделия <i>Таблица 10 Условия транспортировки и хранения медицинского изделия</i>	Storage and transportation conditions <i>Table 10 Storage and transportation conditions</i>								
<table border="1"> <tr> <td>Диапазон рабочих температур:</td><td>от 0 до 40 °C</td></tr> <tr> <td>Диапазон рабочих значений относительной влажности воздуха:</td><td>≤ 80%</td></tr> </table> • Храните изделие в чистом, сухом и темном месте, чтобы избежать длительного воздействия света и влаги. • Среда хранения должна быть защищена от крыс и моли, чтобы сохранить целостность упаковки. • Не допускайте контакта с коррозионным газом.	Диапазон рабочих температур:	от 0 до 40 °C	Диапазон рабочих значений относительной влажности воздуха:	≤ 80%	<table border="1"> <tr> <td>Operating Temperature Range:</td><td>from 0 to 40 °C</td></tr> <tr> <td>Operating Humidity Range:</td><td>≤ 80%</td></tr> </table> • Store the device in a clean, dry and dark place to avoid extended exposure to light and moisture. • Storage environment should be rat-proof and moth-proof in order to keep the integrity of package. Keep it from contacting corrosion gas.	Operating Temperature Range:	from 0 to 40 °C	Operating Humidity Range:	≤ 80%
Диапазон рабочих температур:	от 0 до 40 °C								
Диапазон рабочих значений относительной влажности воздуха:	≤ 80%								
Operating Temperature Range:	from 0 to 40 °C								
Operating Humidity Range:	≤ 80%								
Состав упаковки	Package contents								
Набор для катетеризации центральных вен Shunmei в вариантах исполнения: 1. Набор для катетеризации центральных вен Shunmei однопросветный в вариантах исполнения: 1.1. Набор для катетеризации центральных вен Shunmei однопросветный, диаметр 20 G (0,90 мм.) длина 5 см. в составе: — Катетер центральный венозный однопросветный, диаметр 20 G	Central venous catheter kit Shunmei in variants: 1. Central venous catheter kit Shunmei Single lumen in variants: 1.1. Central venous catheter kit Shunmei Single lumen, diameter 20 G (0,9 mm.) length 5 cm. consists of: — Central venous catheter Single lumen, diameter 20 G (0,9 mm.) length 5 cm. - 1 pc.;								

(0,90 мм.) длина 5 см. - 1 шт.; — Направитель проволоочный 0,018 дюйма (0,46 мм.) x 45 см. - 1 шт.; — Игла интродьюсерная 20Ga - 1 шт.; — Расширитель 4F x 6 см. - 1 шт.; — Скальпель - 1 шт.; — Шприц 5 мл. - 1 шт.; — Колпачок инъекционный - 1 шт.; — Фиксатор катетера 20G - 1 шт.; — Инструкция по применению - 1 шт. 1.2. Набор для катетеризации центральных вен Shunmei однопросветный, диаметр 20 G (0,90 мм.) длина 8 см. в составе: — Катетер центральный венозный однопросветный, диаметр 20 G (0,90 мм) длина 8 см. - 1 шт.; — Направитель проволоочный 0,018 дюйма (0,46 мм.) x 45 см. - 1 шт.; — Игла интродьюсерная 20Ga - 1 шт.; — Расширитель 4F x 6 см. - 1 шт.; — Скальпель - 1 шт.; — Шприц 5 мл. - 1 шт.; — Колпачок инъекционный - 1 шт.; — Фиксатор катетера 20G - 1 шт.; — Инструкция по применению - 1 шт. 1.3. Набор для катетеризации центральных вен Shunmei однопросветный, диаметр 20 G (0,90 мм.) длина 13 см. в составе: — Катетер центральный венозный однопросветный, диаметр 20 G (0,90 мм) длина 13 см. - 1 шт.; — Направитель проволоочный 0,018 дюйма (0,46 мм.) x 45 см. - 1 шт.; — Игла интродьюсерная 20Ga - 1 шт.; — Расширитель 4F x 6 см. - 1 шт.; — Скальпель - 1 шт.; — Шприц 5 мл. - 1 шт.;	— Guide wire 0,018 inch (0,46 mm.) x 45 cm. - 1 pc.; — Introducer needle 20Ga - 1 pc.; — Dilator 4F x 6 cm. - 1 pc.; — Scalpel- 1 pc.; — Syringe 5 ml. - 1 pc.; — Injection cap - 1 pc.; — Catheter clamp 20G - 1 pc.; — Instructions for use - 1 pc. 1.2. Central venous catheter kit Shunmei Single lumen, diameter 20 G (0,9 mm.) length 8 cm. consists of: — Central venous catheter Single lumen, diameter 20 G (0,9 mm) length 8 cm. - 1 pc.; — Guide wire 0,018 inch (0,46 mm.) x 45 cm. - 1 pc.; — Introducer needle 20Ga - 1 pc.; — Dilator 4F x 6 cm. - 1 pc.; — Scalpel- 1 pc.; — Syringe 5 ml. - 1 pc.; — Injection cap - 1 pc.; — Catheter clamp 20G - 1 pc.; — Instructions for use - 1 pc. 1.3. Central venous catheter kit Shunmei Single lumen, diameter 20 G (0,9 mm.) length 13 cm. consists of: — Central venous catheter Single lumen, diameter 20 G (0,9 mm) length 13 cm. - 1 pc.; — Guide wire 0,018 inch (0,46 mm.) x 45 cm. - 1 pc.; — Introducer needle 20Ga - 1 pc.; — Dilator 4F x 6 cm. - 1 pc.; — Scalpel- 1 pc.; — Syringe 5 ml. - 1 pc.; — Injection cap - 1 pc.; — Catheter clamp 20G - 1 pc.;
--	--

- Колпачок инъекционный - 1 шт.;
- Фиксатор катетера 20G - 1 шт.;
- Инструкция по применению- 1 шт.
- 1.4. Набор для катетеризации центральных вен Shunmei
однопросветный, диаметр 20 G (0,90 мм.) длина 15 см. в составе:
 - Катетер центральный венозный однопросветный, диаметр 20 G (0,90 мм) длина 15 см. - 1 шт.;
 - Направитель проволоочный 0,018 дюйма (0,46 мм.) x 45 см. - 1 шт.;
 - Игла интродьюсерная 20Ga - 1 шт.;
 - Расширитель 4F x 6 см. - 1 шт.;
 - Скальпель - 1 шт.;
 - Шприц 5 мл. - 1 шт.;
 - Колпачок инъекционный - 1 шт.;
 - Фиксатор катетера 20G - 1 шт.;
 - Инструкция по применению- 1 шт.
- 1.5. Набор для катетеризации центральных вен Shunmei
однопросветный, диаметр 20 G (0,90 мм.) длина 16 см. в составе:
 - Катетер центральный венозный однопросветный, диаметр 20 G (0,90 мм) длина 16 см. - 1 шт.;
 - Направитель проволоочный 0,018 дюйма (0,46 мм.) x 45 см. - 1 шт.;
 - Игла интродьюсерная 20Ga - 1 шт.;
 - Расширитель 4F x 6 см. - 1 шт.;
 - Скальпель - 1 шт.;
 - Шприц 5 мл. - 1 шт.;
 - Колпачок инъекционный - 1 шт.;
 - Фиксатор катетера 20G - 1 шт.;
 - Инструкция по применению- 1 шт.
- 1.6. Набор для катетеризации центральных вен Shunmei
однопросветный, диаметр 20 G (0,90 мм.) длина 20 см. в составе:
 - Катетер центральный венозный однопросветный, диаметр 20 G (0,90 мм) длина 20 см. - 1 шт.;

- Instructions for use - 1 pc.
- 1.4. Central venous catheter kit Shunmei Single lumen,
diameter 20 G (0,9 mm.) length 15 cm. consists of:
 - Central venous catheter Single lumen, diameter 20 G (0,9 mm) length 15 cm. - 1 pc.;
 - Guide wire 0,018 inch (0,46 mm.) x 45 cm. - 1 pc.;
 - Introducer needle 20Ga - 1 pc.;
 - Dilator 4F x 6 cm. - 1 pc.;
 - Scalpel- 1 pc.;
 - Syringe 5ml. - 1 pc.;
 - Injection cap - 1 pc.;
 - Catheter clamp 20G - 1 pc.;
 - Instructions for use - 1 pc.
- 1.5. Central venous catheter kit Shunmei Single lumen,
diameter 20 G (0,9 mm.) length 16 cm. consists of:
 - Central venous catheter Single lumen, diameter 20 G (0,9 mm) length 16 cm. - 1 pc.;
 - Guide wire 0,018 inch (0,46 mm.) x 45 cm. - 1 pc.;
 - Introducer needle 20Ga - 1 pc.;
 - Dilator 4F x 6 cm. - 1 pc.;
 - Scalpel- 1 pc.;
 - Syringe 5 ml. - 1 pc.;
 - Injection cap - 1 pc.;
 - Catheter clamp 20G - 1 pc.;
 - Instructions for use - 1 pc.
- 1.6. Central venous catheter kit Shunmei Single lumen,
diameter 20 G (0,9 mm.) length 20 cm. consists of:
 - Central venous catheter Single lumen, diameter 20 G (0,9 mm) length 20 cm. - 1 pc.;
 - Guide wire 0,018 inch (0,46 mm.) x 45 cm. - 1 pc.;
 - Introducer needle 20Ga - 1 pc.;

- Направитель проволоочный 0,018 дюйма (0,46 мм.) x 45 см. - 1 шт.;
- Игла интродьюсерная 20Ga - 1 шт.;
- Расширитель 4F x 6 см. - 1 шт.;
- Скальпель - 1 шт.;
- Шприц 5 мл. - 1 шт.;
- Колпачок инъекционный - 1 шт.;
- Фиксатор катетера 20G - 1 шт.;
- Инструкция по применению- 1 шт.
- 1.7. Набор для катетеризации центральных вен Shunmei однопросветный, диаметр 18 G (1,20 мм.) длина 12 см. в составе:
 - Катетер центральный венозный однопросветный, диаметр 18 G (1,20 мм) длина 12 см. - 1 шт.;
 - Направитель проволоочный 0,021 дюйма (0,53 мм.) x 45 см. - 1 шт.;
 - Игла интродьюсерная 20Ga - 1 шт.;
 - Расширитель 5F x 7 см. - 1 шт.;
 - Скальпель - 1 шт.;
 - Шприц 5 мл. - 1 шт.;
 - Колпачок инъекционный - 1 шт.;
 - Фиксатор катетера 4F - 1 шт.;
 - Инструкция по применению- 1 шт.
- 1.8. Набор для катетеризации центральных вен Shunmei однопросветный, диаметр 18 G (1,20 мм.) длина 13 см. в составе:
 - Катетер центральный венозный однопросветный, диаметр 18 G (1,20 мм) длина 13 см. - 1 шт.;
 - Направитель проволоочный 0,021 дюйма (0,53 мм.) x 45 см. - 1 шт.;
 - Игла интродьюсерная 20Ga - 1 шт.;
 - Расширитель 5F x 7 см. - 1 шт.;
 - Скальпель - 1 шт.;
 - Шприц 5 мл. - 1 шт.;
 - Колпачок инъекционный - 1 шт.;

- Dilator 4F x 6 cm. - 1 pc.;
- Scalpel- 1 pc.;
- Syringe 5 ml. - 1 pc.;
- Injection cap - 1 pc.;
- Catheter clamp 20G - 1 pc.;
- Instructions for use - 1 pc.
- 1.7. Central venous catheter kit Shunmei Single lumen, diameter 18 G (1,2 mm.) length 12 cm. consists of: 609110
 - Central venous catheter Single lumen, diameter 18 G (1,2 mm) length 12 cm. - 1 pc.;
 - Guide wire 0,021 inch (0,53 mm.) x 45 cm. - 1 pc.;
 - Introducer needle 20Ga - 1 pc.;
 - Dilator 5F x 7 cm. - 1 pc.;
 - Scalpel- 1 pc.;
 - Syringe 5 ml. - 1 pc.;
 - Injection cap - 1 pc.;
 - Catheter clamp 4F - 1 pc.;
 - Instructions for use - 1 pc.
- 1.8. Central venous catheter kit Shunmei Single lumen, diameter 18 G (1,2 mm.) length 13 cm. consists of:
 - Central venous catheter Single lumen, diameter 18 G (1,2 mm) length 13 cm. - 1 pc.;
 - Guide wire 0,021 inch (0,53 mm.) x 45 cm. - 1 pc.;
 - Introducer needle 20Ga - 1 pc.;
 - Dilator 5F x 7 cm. - 1 pc.;
 - Scalpel- 1 pc.;
 - Syringe 5 ml. - 1 pc.;
 - Injection cap - 1 pc.;
 - Catheter clamp 4F - 1 pc.;
 - Instructions for use - 1 pc.
- 1.9. Central venous catheter kit Shunmei Single lumen,

- Фиксатор катетера 4F - 1 шт.;
- Инструкция по применению- 1 шт.
- 1.9. Набор для катетеризации центральных вен Shunmei однопросветный, диаметр 18 G (1,20 мм.) длина 15 см. в составе:
 - Катетер центральный венозный однопросветный, диаметр 18 G (1,20 мм) длина 15 см. - 1 шт.;
 - Направитель проволоочный 0,021 дюйма (0,53 мм.) x 45 см. - 1 шт.;
 - Игла интродьюсерная 20Ga - 1 шт.;
 - Расширитель 5F x 7 см. - 1 шт.;
 - Скальпель - 1 шт.;
 - Шприц 5 мл. - 1 шт.;
 - Колпачок инъекционный - 1 шт.;
 - Фиксатор катетера 4F - 1 шт.;
 - Инструкция по применению- 1 шт.
- 1.10. Набор для катетеризации центральных вен Shunmei однопросветный, диаметр 18 G (1,20 мм.) длина 16 см. в составе:
 - Катетер центральный венозный однопросветный, диаметр 18 G (1,20 мм) длина 16 см. - 1 шт.;
 - Направитель проволоочный 0,021 дюйма (0,53 мм.) x 45 см. - 1 шт.;
 - Игла интродьюсерная 20Ga - 1 шт.;
 - Расширитель 5F x 7 см. - 1 шт.;
 - Скальпель - 1 шт.;
 - Шприц 5 мл. - 1 шт.;
 - Колпачок инъекционный - 1 шт.;
 - Фиксатор катетера 4F - 1 шт.;
 - Инструкция по применению- 1 шт.
- 1.11. Набор для катетеризации центральных вен Shunmei однопросветный, диаметр 18 G (1,20 мм.) длина 20 см. в составе:
 - Катетер центральный венозный однопросветный, диаметр 18 G (1,20 мм) длина 20 см. - 1 шт.;
 - Направитель проволоочный 0,021 дюйма (0,53 мм.) x 45 см. - 1

- diameter 18 G (1,2 mm.) length 15 cm. consists of:
- Central venous catheter Single lumen, diameter 18 G (1,2 mm) length 15 cm. - 1 pc.;
 - Guide wire 0,021 inch (0,53 mm.) x 45 cm. - 1 pc.;
 - Introducer needle 20Ga - 1 pc.;
 - Dilator 5F x 7 cm. - 1 pc.;
 - Scalpel- 1 pc.;
 - Syringe 5 ml. - 1 pc.;
 - Injection cap - 1 pc.;
 - Catheter clamp 4F - 1 pc.;
 - Instructions for use - 1 pc.
- 1.10. Central venous catheter kit Shunmei Single lumen, diameter 18 G (1,2 mm.) length 16 cm. consists of:
- Central venous catheter Single lumen, diameter 18 G (1,2 mm) length 16 cm. - 1 pc.;
 - Guide wire 0,021 inch (0,53 mm.) x 45 cm. - 1 pc.;
 - Introducer needle 20Ga - 1 pc.;
 - Dilator 5F x 7 cm. - 1 pc.;
 - Scalpel- 1 pc.;
 - Syringe 5 ml. - 1 pc.;
 - Injection cap - 1 pc.;
 - Catheter clamp 4F - 1 pc.;
 - Instructions for use - 1 pc.
- 1.11. Central venous catheter kit Shunmei Single lumen, diameter 18 G (1,2 mm.) length 20 cm. consists of:
- Central venous catheter Single lumen, diameter 18 G (1,2 mm) length 20 cm. - 1 pc.;
 - Guide wire 0,021 inch (0,53 mm.) x 45 cm. - 1 pc.;
 - Introducer needle 20Ga - 1 pc.;
 - Dilator 5F x 7 cm. - 1 pc.;
 - Scalpel- 1 pc.;

шт.; — Игла интродьюсерная 20Ga - 1 шт.; — Расширитель 5F x 7 см. - 1 шт.; — Скальпель - 1 шт.; — Шприц 5 мл. - 1 шт.; — Колпачок инъекционный - 1 шт.; — Фиксатор катетера 4F - 1 шт.; — Инструкция по применению - 1 шт. 1.12. Набор для катетеризации центральных вен Shunmei однопросветный, диаметр 16 G (1,60 мм.) длина 15 см. в составе: — Катетер центральный венозный однопросветный, диаметр 16 G (1,60 мм) длина 15 см. - 1 шт.; — Направитель проволочный 0,032 дюйма (0,81 мм.) x 60 см. - 1 шт.; — Игла интродьюсерная 18Ga - 1 шт.; — Расширитель 7F x 10 см. - 1 шт.; — Скальпель - 1 шт.; — Шприц 5 мл. - 1 шт.; — Колпачок инъекционный - 1 шт.; — Фиксатор катетера 5F - 1 шт.; — Инструкция по применению - 1 шт. 1.13. Набор для катетеризации центральных вен Shunmei однопросветный, диаметр 16 G (1,60 мм.) длина 16 см. в составе: — Катетер центральный венозный однопросветный, диаметр 16 G (1,60 мм) длина 16 см. - 1 шт.; — Направитель проволочный 0,032 дюйма (0,81 мм.) x 60 см. - 1 шт.; — Игла интродьюсерная 18Ga - 1 шт.; — Расширитель 7F x 10 см. - 1 шт.; — Скальпель - 1 шт.; — Шприц 5 мл. - 1 шт.; — Колпачок инъекционный - 1 шт.; — Фиксатор катетера 5F - 1 шт.;	— Syringe 5 ml. - 1 pc.; — Injection cap - 1 pc.; — Catheter clamp 4F - 1 pc.; — Instructions for use - 1 pc. 1.12. Central venous catheter kit Shunmei Single lumen, diameter 16 (1,6 mm.) length 15 cm. consists of: — Central venous catheter Single lumen, diameter 16 G (1,6 mm) length 15 cm. - 1 pc.; — Guide wire 0,032 inch (0,81 mm.) x 60 cm. - 1 pc.; — Introducer needle 18Ga - 1 pc.; — Dilator 7F x 10 cm. - 1 pc.; — Scalpel- 1 pc.; — Syringe 5 ml. - 1 pc.; — Injection cap - 1 pc.; — Catheter clamp 5F - 1 pc.; — Instructions for use - 1 pc. 1.13. Central venous catheter kit Shunmei Single lumen, diameter 16 G (1,6 mm.) length 16 cm. consists of: — Central venous catheter Single lumen, diameter 16 G (1,6 mm) length 16 cm. - 1 pc.; — Guide wire 0,032 inch (0,81 mm.) x 60 cm. - 1 pc.; — Introducer needle 18Ga - 1 pc.; — Dilator 7F x 10 cm. - 1 pc.; — Scalpel- 1 pc.; — Syringe 5 ml. - 1 pc.; — Injection cap - 1 pc.; — Catheter clamp 5F - 1 pc.; — Instructions for use - 1 pc. 1.14. Central venous catheter kit Shunmei Single lumen, diameter 16 G (1,6 mm.) length 20 cm. consists of: — Central venous catheter Single lumen, diameter 16 G (1,6
---	---

- Инструкция по применению- 1 шт.
- 1.14. Набор для катетеризации центральных вен Shunmei
однопросветный, диаметр 16 G (1,60 мм.) длина 20 см. в составе:
- Катетер центральный венозный однопросветный, диаметр 16 G (1,60 мм) длина 20 см. - 1 шт.;
- Направитель проволоочный 0,032 дюйма (0,81 мм.) x 60 см. - 1 шт.;
- Игла интродьюсерная 18Ga - 1 шт.;
- Расширитель 7F x 10 см. - 1 шт.;
- Скальпель - 1 шт.;
- Шприц 5 мл. - 1 шт.;
- Колпачок инъекционный - 1 шт.;
- Фиксатор катетера 5F - 1 шт.;
- Инструкция по применению- 1 шт.
- 1.15. Набор для катетеризации центральных вен Shunmei
однопросветный, диаметр 16 G (1,60 мм.) длина 30 см. в составе:
- Катетер центральный венозный однопросветный, диаметр 16 G (1,60 мм) длина 30 см. - 1 шт.;
- Направитель проволоочный 0,032 дюйма (0,81 мм.) x 60 см. - 1 шт.;
- Игла интродьюсерная 18Ga - 1 шт.;
- Расширитель 7F x 10 см. - 1 шт.;
- Скальпель - 1 шт.;
- Шприц 5 мл. - 1 шт.;
- Колпачок инъекционный - 1 шт.;
- Фиксатор катетера 5F - 1 шт.;
- Инструкция по применению- 1 шт.
- 1.16. Набор для катетеризации центральных вен Shunmei
однопросветный, диаметр 14 G (2,10 мм.) длина 15 см. в составе:
- Катетер центральный венозный однопросветный, диаметр 14 G (2,10 мм) длина 15 см. - 1 шт.;
- Направитель проволоочный 0,032 дюйма (0,81 мм.) x 60 см. - 1 шт.;

- mm) length 20 cm. - 1 pc.;
- Guide wire 0,032 inch (0,81 mm.) x 60 cm. - 1 pc.;
- Introducer needle 18Ga - 1 pc.;
- Dilator 7F x 10 cm. - 1 pc.;
- Scalpel- 1 pc.;
- Syringe 5 ml. - 1 pc.;
- Injection cap - 1 pc.;
- Catheter clamp 5F - 1 pc.;
- Instructions for use - 1 pc.
- 1.15. Central venous catheter kit Shunmei Single lumen,
diameter 16 G (1,6 mm.) length 30 cm. consists of:
- Central venous catheter Single lumen, diameter 16 G (1,6 mm) length 30 cm. - 1 pc.;
- Guide wire 0,032 inch (0,81 mm.) x 60 cm. - 1 pc.;
- Introducer needle 18Ga - 1 pc.;
- Dilator 7F x 10 cm. - 1 pc.;
- Scalpel- 1 pc.;
- Syringe 5 ml. - 1 pc.;
- Injection cap - 1 pc.;
- Catheter clamp 5F - 1 pc.;
- Instructions for use - 1 pc.
- 1.16. Central venous catheter kit Shunmei Single lumen,
diameter 14 G (2,1 mm.) length 15 cm. consists of:
- Central venous catheter Single lumen, diameter 14 G (2,1 mm) length 15 cm. - 1 pc.;
- Guide wire 0,032 inch (0,81 mm.) x 60 cm. - 1 pc.;
- Introducer needle 18Ga - 1 pc.;
- Dilator 8F x 10 cm. - 1 pc.;
- Scalpel- 1 pc.;
- Syringe 5 ml. - 1 pc.;
- Injection cap - 1 pc.;

- Игла интродьюсерная 18Ga - 1 шт.;
- Расширитель 8F x 10 см. - 1 шт.;
- Скальпель - 1 шт.;
- Шприц 5 мл. - 1 шт.;
- Колпачок инъекционный - 1 шт.;
- Фиксатор катетера 7F - 1 шт.;
- Инструкция по применению- 1 шт.

1.17. Набор для катетеризации центральных вен Shunmei однопросветный, диаметр 14 G (2,10 мм.) длина 16 см. в составе:

- Катетер центральный венозный однопросветный, диаметр 14 G (2,10 мм) длина 16 см. - 1 шт.;
- Направитель проволоочный 0,032 дюйма (0,81 мм.) x 60 см. - 1 шт.;
- Игла интродьюсерная 18Ga - 1 шт.;
- Расширитель 8F x 10 см. - 1 шт.;
- Скальпель - 1 шт.;
- Шприц 5 мл. - 1 шт.;
- Колпачок инъекционный - 1 шт.;
- Фиксатор катетера 7F - 1 шт.;
- Инструкция по применению- 1 шт.

1.18. Набор для катетеризации центральных вен Shunmei однопросветный, диаметр 14 G (2,10 мм.) длина 20 см. в составе:

- Катетер центральный венозный однопросветный, диаметр 14 G (2,10 мм) длина 20 см. - 1 шт.;
- Направитель проволоочный 0,032 дюйма (0,81 мм.) x 60 см. - 1 шт.;
- Игла интродьюсерная 18Ga - 1 шт.;
- Расширитель 8F x 10 см. - 1 шт.;
- Скальпель - 1 шт.;
- Шприц 5 мл. - 1 шт.;
- Колпачок инъекционный - 1 шт.;
- Фиксатор катетера 7F - 1 шт.;
- Инструкция по применению- 1 шт.

- Catheter clamp 7F - 1 pc.;
- Instructions for use - 1 pc.

1.17. Central venous catheter kit Shunmei Single lumen, diameter 14 G (2,1 mm.) length 16 cm. consists of:

- Central venous catheter Single lumen, diameter 14 G (2,1 mm) length 16 cm. - 1 pc.;
- Guide wire 0,032 inch (0,81 mm.) x 60 cm. - 1 pc.;
- Introducer needle 18Ga - 1 pc.;
- Dilator 8F x 10 cm. - 1 pc.;
- Scalpel- 1 pc.;
- Syringe 5 ml. - 1 pc.;
- Injection cap - 1 pc.;
- Catheter clamp 7F - 1 pc.;
- Instructions for use - 1 pc.

1.18. Central venous catheter kit Shunmei Single lumen, diameter 14 G (2,1 mm.) length 20 cm. consists of:

- Central venous catheter Single lumen, diameter 14 Ga (2,1 mm) length 20 cm. - 1 pc.;
- Guide wire 0,032 inch (0,81 mm.) x 60 cm. - 1 pc.;
- Introducer needle 18Ga - 1 pc.;
- Dilator 8F x 10 cm. - 1 pc.;
- Scalpel- 1 pc.;
- Syringe 5 ml. - 1 pc.;
- Injection cap - 1 pc.;
- Catheter clamp 7F - 1 pc.;
- Instructions for use - 1 pc.

1.19. Central venous catheter kit Shunmei Single lumen, diameter 14 G (2,1 mm.) length 30 cm. consists of:

- Central venous catheter Single lumen, diameter 14 G (2,1 mm) length 30 cm. - 1 pc.;
- Guide wire 0,032 inch (0,81 mm.) x 60 cm. - 1 pc.;

1.19. Набор для катетеризации центральных вен Shunmei
однопросветный, диаметр 14 G (2,10 мм.) длина 30 см. в составе:

- Катетер центральный венозный однопросветный, диаметр 14 G (2,10 мм) длина 30 см. - 1 шт.;
- Направитель проволоочный 0,032 дюйма (0,81 мм.) x 60 см. - 1 шт.;
- Игла интродюсерная 18Ga - 1 шт.;
- Расширитель 8F x 10 см. - 1 шт.;
- Скальпель - 1 шт.;
- Шприц 5 мл. - 1 шт.;
- Колпачок инъекционный - 1 шт.;
- Фиксатор катетера 7F - 1 шт.;
- Инструкция по применению- 1 шт.

2. Набор для катетеризации центральных вен Shunmei двухпросветный
в вариантах исполнения:

2.1. Набор для катетеризации центральных вен Shunmei
двухпросветный, диаметр 4 Fr (1,33 мм.) длина 5 см. в составе:

- Катетер центральный венозный двухпросветный, диаметр 4 Fr (1,33 мм) длина 5 см. - 1 шт.;
- Направитель проволоочный 0,018 дюйма (0, 0,46 мм.) x 45 см. - 1 шт.;
- Игла интродюсерная 20Ga - 1 шт.;
- Расширитель 5F x 7 см. - 1 шт.;
- Скальпель - 1 шт.;
- Шприц 5 мл. - 1 шт.;
- Колпачок инъекционный - 2 шт.;
- Фиксатор катетера 4F - 1 шт.;
- Инструкция по применению- 1 шт.

2.2. Набор для катетеризации центральных вен Shunmei
двухпросветный, диаметр 4 Fr (1,33 мм.) длина 8 см. в составе:

- Катетер центральный венозный двухпросветный, диаметр 4 Fr (1,33 мм) длина 8 см. - 1 шт.;

- Introducer needle 18Ga - 1 pc.;
- Dilator 8F x 10 cm. - 1 pc.;
- Scalpel- 1 pc.;
- Syringe 5 ml. - 1 pc.;
- Injection cap - 1 pc.;
- Catheter clamp 7F - 1 pc.;
- Instructions for use - 1 pc.

2. Central venous catheter kit Shunmei Double lumen in variants:

2.1. Central venous catheter kit Shunmei Double lumen,
diameter 4 Fr (1,33 mm.) length 5 cm. consists of:

- Central venous catheter Double lumen, diameter 4 Fr (1,33 mm) length 5 cm. - 1 pc.;
- Guide wire 0,018inch (0,46 mm.) x 45 cm. - 1 pc.;
- Introducer needle 20Ga - 1 pc.;
- Dilator 5F×7cm. - 1 pc.;
- Scalpel- 1 pc.;
- Syringe 5 ml. - 1 pc.;
- Injection cap - 2 pc.;
- Catheter clamp 4F - 1 pc.;
- Instructions for use - 1 pc.

2.2. Central venous catheter kit Shunmei Double lumen,
diameter 4 Fr (1,33 mm.) length 8 cm. consists of:

- Central venous catheter Double lumen, diameter 4 Fr (1,33 mm) length 8 cm. - 1 pc.;
- Guide wire 0,018inch (0,46 mm.) x 45 cm. - 1 pc.;
- Introducer needle 20Ga - 1 pc.;
- Dilator 5F×7 cm. - 1 pc.;
- Scalpel- 1 pc.;
- Syringe 5 ml. - 1 pc.;
- Injection cap - 2 pc.;

- Направитель проволоочный 0,018 дюйма (0, 0,46 мм.) x 45 см. - 1 шт.;
- Игла интродьюсерная 20Ga - 1 шт.;
- Расширитель 5F x 7 см. - 1 шт.;
- Скальпель - 1 шт.;
- Шприц 5 мл. - 1 шт.;
- Колпачок инъекционный - 2 шт.;
- Фиксатор катетера 4F - 1 шт.;
- Инструкция по применению- 1 шт.
- 2.3. Набор для катетеризации центральных вен Shunmei двухпросветный, диаметр 4 Fr (1,33 мм.) длина 13 см. в составе:
 - Катетер центральный венозный двухпросветный, диаметр 4 Fr (1,33 мм) длина 13 см. - 1 шт.;
 - Направитель проволоочный 0,018 дюйма (0, 0,46 мм.) x 45 см. - 1 шт.;
 - Игла интродьюсерная 20Ga - 1 шт.;
 - Расширитель 5F x 7 см. - 1 шт.;
 - Скальпель - 1 шт.;
 - Шприц 5 мл. - 1 шт.;
 - Колпачок инъекционный - 2 шт.;
 - Фиксатор катетера 4F - 1 шт.;
 - Инструкция по применению- 1 шт.
- 2.4. Набор для катетеризации центральных вен Shunmei двухпросветный, диаметр 5 Fr (1,67 мм.) длина 8 см. в составе:
 - Катетер центральный венозный двухпросветный, диаметр 5 Fr (1,67 мм) длина 8 см. - 1 шт.;
 - Направитель проволоочный 0,021 дюйма (0,53 мм.) x 45 см. - 1 шт.;
 - Игла интродьюсерная 20Ga - 1 шт.;
 - Расширитель 6F x 8 см. - 1 шт.;
 - Скальпель - 1 шт.;
 - Шприц 5 мл. - 1 шт.;
 - Колпачок инъекционный - 2 шт.;

- Catheter clamp 4F - 1 pc.;
- Instructions for use - 1 pc.
- 2.3. Central venous catheter kit Shunmei Double lumen, diameter 4 Fr (1,33 mm.) length 13 cm. consists of:
 - Central venous catheter Double lumen, diameter 4 Fr (1,33 mm) length 13 cm. - 1 pc.;
 - Guide wire 0,018 inch (0,46 mm.) x 45 cm. - 1 pc.;
 - Introducer needle 20Ga - 1 pc.;
 - Dilator 5F x 7 cm. - 1 pc.;
 - Scalpel- 1 pc.;
 - Syringe 5 ml. - 1 pc.;
 - Injection cap - 2 pc.;
 - Catheter clamp 4F - 1 pc.;
 - Instructions for use - 1 pc.
- 2.4. Central venous catheter kit Shunmei Double lumen, diameter 5 Fr (1,67 mm.) length 8 cm. consists of:
 - Central venous catheter Double lumen, diameter 5 Fr (1,67 mm) length 8 cm. - 1 pc.;
 - Guide wire 0,021 inch (0,53 mm.) x 45 cm. - 1 pc.;
 - Introducer needle 20Ga - 1 pc.;
 - Dilator 6F x 8 cm. - 1 pc.;
 - Scalpel- 1 pc.;
 - Syringe 5 ml. - 1 pc.;
 - Injection cap - 2 pc.;
 - Catheter clamp 5F - 1 pc.;
 - Instructions for use - 1 pc.
- 2.5. Central venous catheter kit Shunmei Double lumen, diameter 5 Fr (1,67 mm.) length 10 cm. consists of:
 - Central venous catheter Double lumen, diameter 5 Fr (1,67 mm) length 10 cm. - 1 pc.;
 - Guide wire 0,021 inch (0,53 mm.) x 45 cm. - 1 pc.;

- Фиксатор катетера 5F - 1 шт.;
- Инструкция по применению- 1 шт.
- 2.5. Набор для катетеризации центральных вен Shunmei двухпросветный, диаметр 5 Fr (1,67 мм.) длина 10 см. в составе:
 - Катетер центральный венозный двухпросветный, диаметр 5 Fr (1,67 мм) длина 10 см. - 1 шт.;
 - Направитель проволоочный 0,021 дюйма (0,53 мм.) x 45 см. - 1 шт.;
 - Игла интродьюсерная 20Ga - 1 шт.;
 - Расширитель 6F x 8 см. - 1 шт.;
 - Скальпель - 1 шт.;
 - Шприц 5 мл. - 1 шт.;
 - Колпачок инъекционный - 2 шт.;
 - Фиксатор катетера 5F - 1 шт.;
 - Инструкция по применению- 1 шт.
- 2.6. Набор для катетеризации центральных вен Shunmei двухпросветный, диаметр 5 Fr (1,67 мм.) длина 13 см. в составе:
 - Катетер центральный венозный двухпросветный, диаметр 5 Fr (1,67 мм) длина 13 см. - 1 шт.;
 - Направитель проволоочный 0,021 дюйма (0,53 мм.) x 45 см. - 1 шт.;
 - Игла интродьюсерная 20Ga - 1 шт.;
 - Расширитель 6F x 8 см. - 1 шт.;
 - Скальпель - 1 шт.;
 - Шприц 5 мл. - 1 шт.;
 - Колпачок инъекционный - 2 шт.;
 - Фиксатор катетера 5F - 1 шт.;
 - Инструкция по применению- 1 шт.
- 2.7. Набор для катетеризации центральных вен Shunmei двухпросветный, диаметр 5 Fr (1,67 мм.) длина 15 см. в составе:
 - Катетер центральный венозный двухпросветный, диаметр 5 Fr (1,67 мм) длина 15 см. - 1 шт.;
 - Направитель проволоочный 0,021 дюйма (0,53 мм.) x 45 см. - 1

- Introducer needle 20Ga - 1 pc.;
- Dilator 6F x 8 cm. - 1 pc.;
- Scalpel- 1 pc.;
- Syringe 5 ml. - 1 pc.;
- Injection cap - 2 pc.;
- Catheter clamp 5F - 1 pc.;
- Instructions for use - 1 pc.
- 2.6. Central venous catheter kit Shunmei Double lumen, diameter 5 Fr (1,67 mm.) length 13 cm. consists of:
 - Central venous catheter Double lumen, diameter 5 Fr (1,67 mm) length 13 cm. - 1 pc.;
 - Guide wire 0,021 inch (0,53 mm.) x 45 cm. - 1 pc.;
 - Introducer needle 20Ga - 1 pc.;
 - Dilator 6F x 8 cm. - 1 pc.;
 - Scalpel- 1 pc.;
 - Syringe 5 ml. - 1 pc.;
 - Injection cap - 2 pc.;
 - Catheter clamp 5F - 1 pc.;
 - Instructions for use - 1 pc.
- 2.7. Central venous catheter kit Shunmei Double lumen, diameter 5 Fr (1,67 mm.) length 15 cm. consists of:
 - Central venous catheter Double lumen, diameter 5 Fr (1,67 mm) length 15 cm. - 1 pc.;
 - Guide wire 0,021 inch (0,53 mm.) x 45 cm. - 1 pc.;
 - Introducer needle 20Ga - 1 pc.;
 - Dilator 6F x 8 cm. - 1 pc.;
 - Scalpel- 1 pc.;
 - Syringe 5 ml. - 1 pc.;
 - Injection cap - 2 pc.;
 - Catheter clamp 5F - 1 pc.;
 - Instructions for use - 1 pc.

шт.; — Игла интродьюсерная 20Ga - 1 шт.; — Расширитель 6F x 8 см. - 1 шт.; — Скальпель - 1 шт.; — Шприц 5 мл. - 1 шт.; — Колпачок инъекционный - 2 шт.; — Фиксатор катетера 5F - 1 шт.; — Инструкция по применению- 1 шт. 2.8. Набор для катетеризации центральных вен Shunmei двухпросветный, диаметр 5 Fr (1,67 мм.) длина 16 см. в составе: — Катетер центральный венозный двухпросветный, диаметр 5 Fr (1,67 мм) длина 16 см. - 1 шт.; — Направитель проволоочный 0,021 дюйма (0,53 мм.) x 45 см. - 1 шт.; — Игла интродьюсерная 20G - 1 шт.; — Расширитель 6F x 8 см. - 1 шт.; — Скальпель - 1 шт.; — Шприц 5 мл. - 1 шт.; — Колпачок инъекционный - 2 шт.; — Фиксатор катетера 5F - 1 шт.; — Инструкция по применению- 1 шт. 2.9. Набор для катетеризации центральных вен Shunmei двухпросветный, диаметр 5 Fr (1,67 мм.) длина 20 см. в составе: — Катетер центральный венозный двухпросветный, диаметр 5 Fr (1,67 мм) длина 20 см. - 1 шт.; — Направитель проволоочный 0,021 дюйма (0,53 мм.) x 45 см. - 1 шт.; — Игла интродьюсерная 20Ga - 1 шт.; — Расширитель 6F x 8 см. - 1 шт.; — Скальпель - 1 шт.; — Шприц 5 мл. - 1 шт.; — Колпачок инъекционный - 2 шт.; — Фиксатор катетера 5F - 1 шт.;	2.8. Central venous catheter kit Shunmei Double lumen, diameter 5 Fr (1,67 mm.) length 16 cm. consists of: — Central venous catheter Double lumen, diameter 5 Fr (1,67 mm) length 16 cm. - 1 pc.; — Guide wire 0,021 inch (0,53 mm.) x 45 cm. - 1 pc.; — Introducer needle 20Ga - 1 pc.; — Dilator 6F x 8 cm. - 1 pc.; — Scalpel- 1 pc.; — Syringe 5 ml. - 1 pc.; — Injection cap - 2 pc.; — Catheter clamp 5F - 1 pc.; — Instructions for use - 1 pc. 2.9. Central venous catheter kit Shunmei Double lumen, diameter 5 Fr (1,67 mm.) length 20 cm. consists of: — Central venous catheter Double lumen, diameter 5 Fr (1,67 mm) length 20 cm. - 1 pc.; — Guide wire 0,021 inch (0,53 mm.) x 45 cm. - 1 pc.; — Introducer needle 20Ga - 1 pc.; — Dilator 6F x 8 cm. - 1 pc.; — Scalpel- 1 pc.; — Syringe 5 ml. - 1 pc.; — Injection cap - 2 pc.; — Catheter clamp 5F - 1 pc.; — Instructions for use - 1 pc. 2.10. Central venous catheter kit Shunmei Double lumen, diameter 7 Fr (2,33 mm.) length 15 cm. consists of: — Central venous catheter Double lumen, diameter 7 Fr (2,33 mm) length 15 cm. - 1 pc.; — Guide wire 0,032 inch (0,81 mm.) x 60 cm. - 1 pc.; — Introducer needle 18Ga - 1 pc.; — Dilator 8F x 10 cm. - 1 pc.;
--	--

- Инструкция по применению- 1 шт.
- 2.10. Набор для катетеризации центральных вен Shunmei двухпросветный, диаметр 7 Fr (2,33 мм.) длина 15 см. в составе:
 - Катетер центральный венозный двухпросветный, диаметр 7 Fr (2,33 мм) длина 15 см. - 1 шт.;
 - Направитель проволоочный 0,032 дюйма (0,81 мм.) x 60 см. - 1 шт.;
 - Игла интродьюсерная 18Ga - 1 шт.;
 - Расширитель 8F x 10 см. - 1 шт.;
 - Скальпель - 1 шт.;
 - Шприц 5 мл. - 1 шт.;
 - Колпачок инъекционный - 2 шт.;
 - Фиксатор катетера 7F - 1 шт.;
 - Инструкция по применению- 1 шт.
- 2.11. Набор для катетеризации центральных вен Shunmei двухпросветный, диаметр 7 Fr (2,33 мм.) длина 16 см. в составе:
 - Катетер центральный венозный двухпросветный, диаметр 7 Fr (2,33 мм) длина 16 см. - 1 шт.;
 - Направитель проволоочный 0,032 дюйма (0,81 мм.) x 60 см. - 1 шт.;
 - Игла интродьюсерная 18Ga - 1 шт.;
 - Расширитель 8F x 10 см. - 1 шт.;
 - Скальпель - 1 шт.;
 - Шприц 5 мл. - 1 шт.;
 - Колпачок инъекционный - 2 шт.;
 - Фиксатор катетера 7F - 1 шт.;
 - Инструкция по применению- 1 шт.
- 2.12. Набор для катетеризации центральных вен Shunmei двухпросветный, диаметр 7 Fr (2,33 мм.) длина 18 см.. в составе:
 - Катетер центральный венозный двухпросветный, диаметр 7 Fr (2,33 мм) длина 18 см. - 1 шт.;
 - Направитель проволоочный 0,032 дюйма (0,81 мм.) x 60 см. - 1 шт.;

- Scalpel- 1 pc.;
- Syringe 5 ml. - 1 pc.;
- Injection cap - 2 pc.;
- Catheter clamp 7F - 1 pc.;
- Instructions for use - 1 pc.
- 2.11. Central venous catheter kit Shunmei Double lumen, diameter 7 Fr (2,33 mm.) length 16 cm. consists of:
 - Central venous catheter Double lumen, diameter 7 Fr (2,33 mm) length 16 cm. - 1 pc.;
 - Guide wire 0,032 inch (0,81 mm.) x 60 cm. - 1 pc.;
 - Introducer needle 18Ga - 1 pc.;
 - Dilator 8F x 10 cm. - 1 pc.;
 - Scalpel- 1 pc.;
 - Syringe 5 ml. - 1 pc.;
 - Injection cap - 2 pc.;
 - Catheter clamp 7F - 1 pc.;
 - Instructions for use - 1 pc.
- 2.12. Central venous catheter kit Shunmei Double lumen, diameter 7 Fr (2,33 mm.) length 18 cm. consists of:
 - Central venous catheter Double lumen, diameter 7 Fr (2,33 mm) length 18 cm. - 1 pc.;
 - Guide wire 0,032 inch (0,81 mm.) x 60 cm. - 1 pc.;
 - Introducer needle 18Ga - 1 pc.;
 - Dilator 8F x 10 cm. - 1 pc.;
 - Scalpel- 1 pc.;
 - Syringe 5 ml. - 1 pc.;
 - Injection cap - 2 pc.;
 - Catheter clamp 7F - 1 pc.;
 - Instructions for use - 1 pc.
- 2.13. Central venous catheter kit Shunmei Double lumen, diameter 7 Fr (2,33 mm.) length 20 cm. consists of:

- Игла интродьюсерная 18Ga - 1 шт.;
- Расширитель 8F x 10 см. - 1 шт.;
- Скальпель - 1 шт.;
- Шприц 5 мл. - 1 шт.;
- Колпачок инъекционный - 2 шт.;
- Фиксатор катетера 7F - 1 шт.;
- Инструкция по применению- 1 шт.

2.13. Набор для катетеризации центральных вен Shunmei двухпросветный, диаметр 7 Fr (2,33 мм.) длина 20 см. в составе:

- Катетер центральный венозный двухпросветный, диаметр 7 Fr (2,33 мм) длина 20 см. - 1 шт.;
- Направитель проволоочный 0,032 дюйма (0,81 мм.) x 60 см. - 1 шт.;
- Игла интродьюсерная 18Ga - 1 шт.;
- Расширитель 8F x 10 см. - 1 шт.;
- Скальпель - 1 шт.;
- Шприц 5 мл. - 1 шт.;
- Колпачок инъекционный - 2 шт.;
- Фиксатор катетера 7F - 1 шт.;
- Инструкция по применению- 1 шт.

2.14. Набор для катетеризации центральных вен Shunmei двухпросветный, диаметр 7 Fr (2,33 мм.) длина 30 см. в составе:

- Катетер центральный венозный двухпросветный, диаметр 7 Fr (2,33 мм) длина 30 см. - 1 шт.;
- Направитель проволоочный 0,032 дюйма (0,81 мм.) x 60 см. - 1 шт.;
- Игла интродьюсерная 18Ga - 1 шт.;
- Расширитель 8F x 10 см. - 1 шт.;
- Скальпель - 1 шт.;
- Шприц 5 мл. - 1 шт.;
- Колпачок инъекционный - 2 шт.;
- Фиксатор катетера 7F - 1 шт.;
- Инструкция по применению- 1 шт.

- Central venous catheter Double lumen, diameter 7 Fr (2,33 mm) length 20 cm. - 1 pc.;
- Guide wire 0,032 inch (0,81 mm.) x 60 cm. - 1 pc.;
- Introducer needle 18Ga - 1 pc.;
- Dilator 8F x 10 cm. - 1 pc.;
- Scalpel- 1 pc.;
- Syringe 5 ml. - 1 pc.;
- Injection cap - 2 pc.;
- Catheter clamp 7F - 1 pc.;
- Instructions for use - 1 pc.

2.14. Central venous catheter kit Shunmei Double lumen, diameter 7 Fr (2,33 mm.) length 30 cm. consists of:

- Central venous catheter Double lumen, diameter 7 Fr (2,33 mm) length 30 cm. - 1 pc.;
- Guide wire 0,032 inch (0,81 mm.) x 60 cm. - 1 pc.;
- Introducer needle 18Ga - 1 pc.;
- Dilator 8F x 10 cm. - 1 pc.;
- Scalpel- 1 pc.;
- Syringe 5 ml. - 1 pc.;
- Injection cap - 2 pc.;
- Catheter clamp 7F - 1 pc.;
- Instructions for use - 1 pc.

2.15. Central venous catheter kit Shunmei Double lumen, diameter 8 Fr (2,66 mm.) length 15 cm. consists of:

- Central venous catheter Double lumen, diameter 8 Fr (2,66 mm) length 15 cm. - 1 pc.;
- Guide wire 0,032 inch (0,81 mm.) x 60 cm. - 1 pc.;
- Introducer needle 18Ga - 1 pc.;
- Dilator 9F x 10 cm. - 1 pc.;
- Scalpel- 1 pc.;
- Syringe 5 ml. - 1 pc.;

2.15. Набор для катетеризации центральных вен Shunmei двухпросветный, диаметр 8 Fr (2,66 мм.) длина 15 см. в составе:

- Катетер центральный венозный двухпросветный, диаметр 8 Fr (2,66 мм) длина 15 см. - 1 шт.;
- Направитель проволоочный 0,032 дюйма (0,81 мм.) x 60 см. - 1 шт.;
- Игла интродьюсерная 18Ga - 1 шт.;
- Расширитель 9F x 10 см. - 1 шт.;
- Скальпель - 1 шт.;
- Шприц 5 мл. - 1 шт.;
- Колпачок инъекционный - 2 шт.;
- Фиксатор катетера 8F - 1 шт.;
- Инструкция по применению- 1 шт.

2.16. Набор для катетеризации центральных вен Shunmei двухпросветный, диаметр 8 Fr (2,66 мм.) длина 16 см. в составе:

- Катетер центральный венозный двухпросветный, диаметр 8 Fr (2,66 мм) длина 16 см. - 1 шт.;
- Направитель проволоочный 0,032 дюйма (0,81 мм.) x 60 см. - 1 шт.;
- Игла интродьюсерная 18Ga - 1 шт.;
- Расширитель 9F x 10 см. - 1 шт.;
- Скальпель - 1 шт.;
- Шприц 5 мл. - 1 шт.;
- Колпачок инъекционный - 2 шт.;
- Фиксатор катетера 8F - 1 шт.;
- Инструкция по применению- 1 шт.

2.17. Набор для катетеризации центральных вен Shunmei двухпросветный, диаметр 8 Fr (2,66 мм.) длина 20 см. в составе:

- Катетер центральный венозный двухпросветный, диаметр 8 Fr (2,66 мм) длина 20 см. - 1 шт.;
- Направитель проволоочный 0,032 дюйма (0,81 мм.) x 60 см. - 1 шт.;
- Игла интродьюсерная 18Ga - 1 шт.;

- Injection cap - 2 pc.;
- Catheter clamp 8F - 1 pc.;
- Instructions for use - 1 pc.

2.16. Central venous catheter kit Shunmei Double lumen, diameter 8 Fr (2,66 mm.) length 16 cm. consists of:

- Central venous catheter Double lumen, diameter 8 Fr (2,66 mm) length 16 cm. - 1 pc.;
- Guide wire 0,032 inch (0,81 mm.) x 60 cm. - 1 pc.;
- Introducer needle 18Ga - 1 pc.;
- Dilator 9F x 10 cm. - 1 pc.;
- Scalpel- 1 pc.;
- Syringe 5 ml. - 1 pc.;
- Injection cap - 2 pc.;
- Catheter clamp 8F - 1 pc.;
- Instructions for use - 1 pc.

2.17. Central venous catheter kit Shunmei Double lumen, diameter 8 Fr (2,66 mm.) length 20 cm. consists of:

- Central venous catheter Double lumen, diameter 8 Fr (2,66 mm) length 20 cm. - 1 pc.;
- Guide wire 0,032 inch (0,81 mm.) x 60 cm. - 1 pc.;
- Introducer needle 18Ga - 1 pc.;
- Dilator 9F x 10 cm. - 1 pc.;
- Scalpel- 1 pc.;
- Syringe 5 ml. - 1 pc.;
- Injection cap - 2 pc.;
- Catheter clamp 8F - 1 pc.;
- Instructions for use - 1 pc.

2.18. Central venous catheter kit Shunmei Double lumen, diameter 8 Fr (2,66 mm.) length 30 cm. consists of:

- Central venous catheter Double lumen, diameter 8 Fr (2,66 mm) length 30 cm. - 1 pc.;

- Расширитель 9F x 10 см. - 1 шт.;
- Скальпель - 1 шт.;
- Шприц 5 мл. - 1 шт.;
- Колпачок инъекционный - 2 шт.;
- Фиксатор катетера 8F - 1 шт.;
- Инструкция по применению- 1 шт.

2.18. Набор для катетеризации центральных вен Shunmei двухпросветный, диаметр 8 Fr (2,66 мм.) длина 30 см. в составе:

- Катетер центральный венозный двухпросветный, диаметр 8 Fr (2,66 мм) длина 30 см. - 1 шт.;
- Направитель проволоочный 0,032 дюйма (0,81 мм.) x 60 см. - 1 шт.;
- Игла интродьюсерная 18Ga - 1 шт.;
- Расширитель 9F x 10 см. - 1 шт.;
- Скальпель - 1 шт.;
- Шприц 5 мл. - 1 шт.;
- Колпачок инъекционный - 2 шт.;
- Фиксатор катетера 8F - 1 шт.;
- Инструкция по применению- 1 шт.

3. Набор для катетеризации центральных вен Shunmei трехпросветный в вариантах исполнения:

3.1. Набор для катетеризации центральных вен Shunmei трехпросветный, диаметр 5 Fr (1,67 мм.) длина 13 см. в составе:

- Катетер центральный венозный трехпросветный, диаметр 5 Fr (1,67 мм) длина 13 см. - 1 шт.;
- Направитель проволоочный 0,021 дюйма (0,53 мм.) x 45 см. - 1 шт.;
- Игла интродьюсерная 20Ga - 1 шт.;
- Расширитель 6F x 8 см. - 1 шт.;
- Скальпель - 1 шт.;
- Шприц 5 мл. - 1 шт.;
- Колпачок инъекционный - 3 шт.;

- Guide wire 0,032 inch (0,81 mm.) x 60 cm. - 1 pc.;
- Introducer needle 18Ga - 1 pc.;
- Dilator 9F x 10 cm. - 1 pc.;
- Scalpel- 1 pc.;
- Syringe 5 ml. - 1 pc.;
- Injection cap - 2 pc.;
- Catheter clamp 8F - 1 pc.;
- Instructions for use - 1 pc.

3. Central venous catheter kit Shunmei Triple lumen in variants:

3.1. Central venous catheter kit Shunmei Triple lumen, diameter 5 Fr (1,67 mm.) length 13 cm. consists of:

- Central venous catheter Triple lumen, diameter 5 Fr (1,67 mm) length 13 cm. - 1 pc.;
- Guide wire 0,021 inch (0,53 mm.) x 45 cm. - 1 pc.;
- Introducer needle 20Ga - 1 pc.;
- Dilator 6F x 8 cm. - 1 pc.;
- Scalpel- 1 pc.;
- Syringe 5 ml. - 1 pc.;
- Injection cap - 3 pc.;
- Catheter clamp 6F - 1 pc.;
- Instructions for use - 1 pc.

3.2. Central venous catheter kit Shunmei Triple lumen, diameter 5,5 Fr (1,83 mm.) length 8 cm. consists of:

- Central venous catheter Triple lumen, diameter 5,5 Fr (1,83 mm) length 8 cm. - 1 pc.;
- Guide wire 0,021 inch (0,53 mm.) x 45 cm. - 1 pc.;
- Introducer needle 20Ga - 1 pc.;
- Dilator 6F x 8 cm. - 1 pc.;
- Scalpel- 1 pc.;
- Syringe 5 ml. - 1 pc.;

- Фиксатор катетера 6F - 1 шт.;
- Инструкция по применению- 1 шт.
- 3.2. Набор для катетеризации центральных вен Shunmei трехпросветный, диаметр 5,5 Fr (1,83 мм.) длина 8 см. в составе:
 - Катетер центральный венозный трехпросветный, диаметр 5,5 Fr (1,83 мм) длина 8 см. - 1 шт.;
 - Направитель проволоочный 0,021 дюйма (0,53 мм.) x 45 см. - 1 шт.;
 - Игла интродьюсерная 20Ga - 1 шт.;
 - Расширитель 6F x 8 см. - 1 шт.;
 - Скальпель - 1 шт.;
 - Шприц 5 мл. - 1 шт.;
 - Колпачок инъекционный - 3 шт.;
 - Фиксатор катетера 6F - 1 шт.;
 - Инструкция по применению- 1 шт.
- 3.3. Набор для катетеризации центральных вен Shunmei трехпросветный, диаметр 5,5 Fr (1,83 мм.) длина 13 см. в составе:
 - Катетер центральный венозный трехпросветный, диаметр 5,5 Fr (1,83 мм) длина 13 см. - 1 шт.;
 - Направитель проволоочный 0,021 дюйма (0,53 мм.) x 45 см. - 1 шт.;
 - Игла интродьюсерная 20Ga - 1 шт.;
 - Расширитель 6F x 8 см. - 1 шт.;
 - Скальпель - 1 шт.;
 - Шприц 5 мл. - 1 шт.;
 - Колпачок инъекционный - 3 шт.;
 - Фиксатор катетера 6F - 1 шт.;
 - Инструкция по применению- 1 шт.
- 3.4. Набор для катетеризации центральных вен Shunmei трехпросветный, диаметр 5,5 Fr (1,83 мм.) длина 15 см. в составе:
 - Катетер центральный венозный трехпросветный, диаметр 5,5 Fr

- Injection cap - 3 pc.;
- Catheter clamp 6F - 1 pc.;
- Instructions for use - 1 pc.
- 3.3. Central venous catheter kit Shunmei Triple lumen, diameter 5,5 Fr (1,83 mm.) length 13 cm. consists of:
 - Central venous catheter Triple lumen, diameter 5,5 Fr (1,83 mm) length 13 cm. - 1 pc.;
 - Guide wire 0,021 inch (0,53 mm.) x 45 cm. - 1 pc.;
 - Introducer needle 20Ga - 1 pc.;
 - Dilator 6F x 8 cm. - 1 pc.;
 - Scalpel- 1 pc.;
 - Syringe 5 ml. - 1 pc.;
 - Injection cap - 3 pc.;
 - Catheter clamp 6F - 1 pc.;
 - Instructions for use - 1 pc.
- 3.4. Central venous catheter kit Shunmei Triple lumen, diameter 5,5 Fr (1,83 mm.) length 15 cm. consists of:
 - Central venous catheter Triple lumen, diameter 5,5 Fr (1,83 mm) length 15 cm. - 1 pc.;
 - Guide wire 0,021 inch (0,53 mm.) x 45 cm. - 1 pc.;
 - Introducer needle 20Ga - 1 pc.;
 - Dilator 6F x 8 cm. - 1 pc.;
 - Scalpel- 1 pc.;
 - Syringe 5 ml. - 1 pc.;
 - Injection cap - 3 pc.;
 - Catheter clamp 6F - 1 pc.;
 - Instructions for use - 1 pc.
- 3.5. Central venous catheter kit Shunmei Triple lumen, diameter 5,5 Fr (1,83 mm.) length 16 cm. consists of:
 - Central venous catheter Triple lumen, diameter 5,5 Fr (1,83 mm) length 16 cm. - 1 pc.;

(1,83 мм) длина 15 см. - 1 шт.; — Направитель проволоочный 0,021 дюйма (0,53 мм.) x 45 см. - 1 шт.; — Игла интродьюсерная 20Ga - 1 шт.; — Расширитель 6F x 8 см. - 1 шт.; — Скальпель - 1 шт.; — Шприц 5 мл. - 1 шт.; — Колпачок инъекционный - 3 шт.; — Фиксатор катетера 6F - 1 шт.; — Инструкция по применению- 1 шт. 3.5. Набор для катетеризации центральных вен Shunmei трехпросветный, диаметр 5,5 Fr (1,83 мм.) длина 16 см. в составе: — Катетер центральный венозный трехпросветный, диаметр 5,5 Fr (1,83 мм) длина 16 см. - 1 шт.; — Направитель проволоочный 0,021 дюйма (0,53 мм.) x 45 см. - 1 шт.; — Игла интродьюсерная 20Ga - 1 шт.; — Расширитель 6F x 8 см. - 1 шт.; — Скальпель - 1 шт.; — Шприц 5 мл. - 1 шт.; — Колпачок инъекционный - 3 шт.; — Фиксатор катетера 6F - 1 шт.; — Инструкция по применению- 1 шт. 3.6. Набор для катетеризации центральных вен Shunmei трехпросветный, диаметр 5,5 Fr (1,83 мм.) длина 20 см. в составе: — Катетер центральный венозный трехпросветный, диаметр 5,5 Fr (1,83 мм) длина 20 см. - 1 шт.; — Направитель проволоочный 0,021 дюйма (0,53 мм.) x 45 см. - 1 шт.; — Игла интродьюсерная 20Ga - 1 шт.; — Расширитель 6F x 8 см. - 1 шт.;	— Guide wire 0,021 inch (0,53 mm.) x 45 cm. - 1 pc.; — Introducer needle 20Ga - 1 pc.; — Dilator 6F x 8 cm. - 1 pc.; — Scalpel- 1 pc.; — Syringe 5 ml. - 1 pc.; — Injection cap - 3 pc.; — Catheter clamp 6F - 1 pc.; — Instructions for use - 1 pc. 3.6. Central venous catheter kit Shunmei Triple lumen, diameter 5,5 Fr (1,83 mm.) length 20 cm. consists of: — Central venous catheter Triple lumen, diameter 5,5 Fr (1,83 mm) length 20 cm. - 1 pc.; — Guide wire 0,021 inch (0,53 mm.) x 45 cm. - 1 pc.; — Introducer needle 20Ga - 1 pc.; — Dilator 6F x 8 cm. - 1 pc.; — Scalpel- 1 pc.; — Syringe 5 ml. - 1 pc.; — Injection cap - 3 pc.; — Catheter clamp 6F - 1 pc.; — Instructions for use - 1 pc. 3.7. Central venous catheter kit Shunmei Triple lumen, diameter 7 Fr (2,33 mm.) length 15 cm. consists of: — Central venous catheter Triple lumen, diameter 7 Fr (2,33 mm) length 15 cm. - 1 pc.; — Guide wire 0,032 inch (0,81 mm.) x 60 cm. - 1 pc.; — Introducer needle 18Ga - 1 pc.; — Dilator 8F x 10 cm. - 1 pc.; — Scalpel- 1 pc.; — Syringe 5 ml. - 1 pc.; — Injection cap - 3 pc.; — Catheter clamp 7F - 1 pc.;
--	--

- Скальпель - 1 шт.;
 - Шприц 5 мл. - 1 шт.;
 - Колпачок инъекционный - 3 шт.;
 - Фиксатор катетера 6F - 1 шт.;
 - Инструкция по применению- 1 шт.
- 3.7. Набор для катетеризации центральных вен Shunmei трехпросветный, диаметр 7 Fr (2,33 мм.) длина 15 см. в составе:
- Катетер центральный венозный трехпросветный, диаметр 7 Fr (2,33 мм) длина 15 см. - 1 шт.;
 - Направитель проволоочный 0,032 дюйма (0,81 мм.) x 60 см. - 1 шт.;
 - Игла интродьюсерная 18Ga - 1 шт.;
 - Расширитель 8F x 10 см. - 1 шт.;
 - Скальпель - 1 шт.;
 - Шприц 5 мл. - 1 шт.;
 - Колпачок инъекционный - 3 шт.;
 - Фиксатор катетера 7F - 1 шт.;
 - Инструкция по применению- 1 шт.
- 3.8. Набор для катетеризации центральных вен Shunmei трехпросветный, диаметр 7 Fr (2,33 мм.) длина 16 см. в составе:
- Катетер центральный венозный трехпросветный, диаметр 7 Fr (2,33 мм) длина 16 см. - 1 шт.;
 - Направитель проволоочный 0,032 дюйма (0,81 мм.) x 60 см. - 1 шт.;
 - Игла интродьюсерная 18Ga - 1 шт.;
 - Расширитель 8F x 10 см. - 1 шт.;
 - Скальпель - 1 шт.;
 - Шприц 5 мл. - 1 шт.;
 - Колпачок инъекционный - 3 шт.;
 - Фиксатор катетера 7F - 1 шт.;
 - Инструкция по применению- 1 шт.
- 3.9. Набор для катетеризации центральных вен Shunmei трехпросветный, диаметр 7 Fr (2,33 мм.) длина 18 см. в составе:

- Instructions for use - 1 pc.
- 3.8. Central venous catheter kit Shunmei Triple lumen, diameter 7 Fr (2,33 mm.) length 16 cm. consists of:
- Central venous catheter Triple lumen, diameter 7 Fr (2,33 mm) length 16 cm. - 1 pc.;
 - Guide wire 0,032 inch (0,81 mm.) x 60 cm. - 1 pc.;
 - Introducer needle 18Ga - 1 pc.;
 - Dilator 8F x 10 cm. - 1 pc.;
 - Scalpel- 1 pc.;
 - Syringe 5 ml. - 1 pc.;
 - Injection cap - 3 pc.;
 - Catheter clamp 7F - 1 pc.;
 - Instructions for use - 1 pc.
- 3.9. Central venous catheter kit Shunmei Triple lumen, diameter 7 Fr (2,33 mm.) length 18 cm. consists of:
- Central venous catheter Triple lumen, diameter 7 Fr (2,33 mm) length 18 cm. - 1 pc.;
 - Guide wire 0,032 inch (0,81 mm.) x 60 cm. - 1 pc.;
 - Introducer needle 18Ga - 1 pc.;
 - Dilator 8F x 10 cm. - 1 pc.;
 - Scalpel- 1 pc.;
 - Syringe 5 ml. - 1 pc.;
 - Injection cap - 3 pc.;
 - Catheter clamp 7F - 1 pc.;
 - Instructions for use - 1 pc.
- 3.10. Central venous catheter kit Shunmei Triple lumen, diameter 7 Fr (2,33 mm.) length 20 cm. consists of:
- Central venous catheter Triple lumen, diameter 7 Fr (2,33 mm) length 20 cm. - 1 pc.;
 - Guide wire 0,032 inch (0,81 mm.) x 60 cm. - 1 pc.;
 - Introducer needle 18Ga - 1 pc.;

- Катетер центральный венозный трехпросветный, диаметр 7 Fr (2,33 мм) длина 18 см. - 1 шт.;
 - Направитель проволоочный 0,032 дюйма (0,81 мм.) x 60 см. - 1 шт.;
 - Игла интродьюсерная 18Ga - 1 шт.;
 - Расширитель 8F x 10 см. - 1 шт.;
 - Скальпель - 1 шт.;
 - Шприц 5 мл. - 1 шт.;
 - Колпачок инъекционный - 3 шт.;
 - Фиксатор катетера 7F - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
- 3.10. Набор для катетеризации центральных вен Shunmei трехпросветный, диаметр 7 Fr (2,33 мм.) длина 20 см. в составе:
- Катетер центральный венозный трехпросветный, диаметр 7 Fr (2,33 мм) длина 20 см. - 1 шт.;
 - Направитель проволоочный 0,032 дюйма (0,81 мм.) x 60 см. - 1 шт.;
 - Игла интродьюсерная 18Ga - 1 шт.;
 - Расширитель 8F x 10 см. - 1 шт.;
 - Скальпель - 1 шт.;
 - Шприц 5 мл. - 1 шт.;
 - Колпачок инъекционный - 3 шт.;
 - Фиксатор катетера 7F - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
- 3.11. Набор для катетеризации центральных вен Shunmei трехпросветный, диаметр 7 Fr (2,33 мм.) длина 30 см. в составе:
- Катетер центральный венозный трехпросветный, диаметр 7 Fr (2,33 мм) длина 30 см. - 1 шт.;
 - Направитель проволоочный 0,032 дюйма (0,81 мм.) x 60 см. - 1 шт.;
 - Игла интродьюсерная 18Ga - 1 шт.;
 - Расширитель 8F x 10 см. - 1 шт.;
 - Скальпель - 1 шт.;

- Dilator 8F x 10 cm. - 1 pc.;
- Scalpel- 1 pc.;
- Syringe 5 ml. - 1 pc.;
- Injection cap - 3 pc.;
- Catheter clamp 7F - 1 pc.;
- Instructions for use - 1 pc.

3.11. Central venous catheter kit Shunmei Triple lumen, diameter 7 Fr (2,33 mm.) length 30 cm. consists of:

- Central venous catheter Triple lumen, diameter 7 Fr (2,33 mm) length 30 cm. - 1 pc.;
- Guide wire 0,032 inch (0,81 mm.) x 60 cm. - 1 pc.;
- Introducer needle 18Ga - 1 pc.;
- Dilator 8F x 10 cm. - 1 pc.;
- Scalpel- 1 pc.;
- Syringe 5 ml. - 1 pc.;
- Injection cap - 3 pc.;
- Catheter clamp 7F - 1 pc.;
- Instructions for use - 1 pc.

3.12. Central venous catheter kit Shunmei Triple lumen, diameter 8 Fr (2,67 mm.) length 20 cm. consists of:

- Central venous catheter Triple lumen, diameter 8 Fr (2,67 mm) length 20 cm. - 1 pc.;
- Guide wire 0,032 inch (0,81 mm.) x 60 cm. - 1 pc.;
- Introducer needle 18Ga - 1 pc.;
- Dilator 9F x 10 cm. - 1 pc.;
- Scalpel- 1 pc.;
- Syringe 5 ml. - 1 pc.;
- Injection cap - 3 pc.;
- Catheter clamp 8F - 1 pc.;
- Instructions for use - 1 pc.

3.13. Central venous catheter kit Shunmei Triple lumen,

- Шприц 5 мл. - 1 шт.;
 - Колпачок инъекционный - 3 шт.;
 - Фиксатор катетера 7F - 1 шт.;
 - Инструкция по применению- 1 шт.
- 3.12. Набор для катетеризации центральных вен Shunmei трехпросветный, диаметр 8 Fr (2,67 мм.) длина 20 см. в составе:
- Катетер центральный венозный трехпросветный, диаметр 8 Fr (2,67 мм) длина 20 см. - 1 шт.;
 - Направитель проволоочный 0,032 дюйма (0,81 мм.) x 60 см. - 1 шт.;
 - Игла интродьюсерная 18Ga - 1 шт.;
 - Расширитель 9F x 10 см. - 1 шт.;
 - Скальпель - 1 шт.;
 - Шприц 5 мл. - 1 шт.;
 - Колпачок инъекционный - 3 шт.;
 - Фиксатор катетера 8F - 1 шт.;
 - Инструкция по применению- 1 шт.
- 3.13. Набор для катетеризации центральных вен Shunmei трехпросветный, диаметр 8,5 Fr (2,83 мм.) длина 15 см. в составе:
- Катетер центральный венозный трехпросветный, диаметр 8,5 Fr (2,83 мм) длина 15 см. - 1 шт.;
 - Направитель проволоочный 0,032 дюйма (0,81 мм.) x 60 см. - 1 шт.;
 - Игла интродьюсерная 18Ga - 1 шт.;
 - Расширитель 9F x 10 см. - 1 шт.;
 - Скальпель - 1 шт.;
 - Шприц 5 мл. - 1 шт.;
 - Колпачок инъекционный - 3 шт.;
 - Фиксатор катетера 8F - 1 шт.;
 - Инструкция по применению- 1 шт.
- 3.14. Набор для катетеризации центральных вен Shunmei трехпросветный, диаметр 8,5 Fr (2,83 мм.) длина 16 см. в

- diameter 8,5 Fr (2,83 mm.) length 15 cm. consists of:
- Central venous catheter Triple lumen, diameter 8,5 Fr (2,83 mm) length 15 cm. - 1 pc.;
 - Guide wire 0,032 inch (0,81 mm.) x 60 cm. - 1 pc.;
 - Introducer needle 18Ga - 1 pc.;
 - Dilator 9F x 10 cm. - 1 pc.;
 - Scalpel- 1 pc.;
 - Syringe 5 ml. - 1 pc.;
 - Injection cap - 3 pc.;
 - Catheter clamp 8F - 1 pc.;
 - Instructions for use - 1 pc.
- 3.14. Central venous catheter kit Shunmei Triple lumen, diameter 8,5 Fr (2,83 mm.) length 16 cm. consists of:
- Central venous catheter Triple lumen, diameter 8,5 Fr (2,83 mm) length 16 cm. - 1 pc.;
 - Guide wire 0,032 inch (0,81 mm.) x 60 cm. - 1 pc.;
 - Introducer needle 18Ga - 1 pc.;
 - Dilator 9F x 10 cm. - 1 pc.;
 - Scalpel- 1 pc.;
 - Syringe 5 ml. - 1 pc.;
 - Injection cap - 3 pc.;
 - Catheter clamp 8F - 1 pc.;
 - Instructions for use - 1 pc.
- 3.15. Central venous catheter kit Shunmei Triple lumen, diameter 8,5 Fr (2,83 mm.) length 20 cm. consists of:
- Central venous catheter Triple lumen, diameter 8,5 Fr (2,83 mm) length 20 cm. - 1 pc.;
 - Guide wire 0,032 inch (0,81 mm.) x 60 cm. - 1 pc.;
 - Introducer needle 18Ga - 1 pc.;
 - Dilator 9F x 10 cm. - 1 pc.;
 - Scalpel- 1 pc.;

составе:

- Катетер центральный венозный трехпросветный, диаметр 8,5 Fr (2,83 мм) длина 16 см. - 1 шт.;
- Направитель проволоочный 0,032 дюйма (0,81 мм.) x 60 см. - 1 шт.;
- Игла интродьюсерная 18Ga - 1 шт.;
- Расширитель 9F x 10 см. - 1 шт.;
- Скальпель - 1 шт.;
- Шприц 5 мл. - 1 шт.;
- Колпачок инъекционный - 3 шт.;
- Фиксатор катетера 8F - 1 шт.;
- Инструкция по применению - 1 шт.

3.15. Набор для катетеризации центральных вен Shunmei трехпросветный, диаметр 8,5 Fr (2,83 мм.) длина 20 см. в составе:

- Катетер центральный венозный трехпросветный, диаметр 8,5 Fr (2,83 мм) длина 20 см. - 1 шт.;
- Направитель проволоочный 0,032 дюйма (0,81 мм.) x 60 см. - 1 шт.;
- Игла интродьюсерная 18Ga - 1 шт.;
- Расширитель 9F x 10 см. - 1 шт.;
- Скальпель - 1 шт.;
- Шприц 5 мл. - 1 шт.;
- Колпачок инъекционный - 3 шт.;
- Фиксатор катетера 8F - 1 шт.;
- Инструкция по применению - 1 шт.

3.16. Набор для катетеризации центральных вен Shunmei трехпросветный, диаметр 8,5 Fr (2,83 мм.) длина 30 см. в составе:

- Катетер центральный венозный трехпросветный, диаметр 8,5 Fr (2,83 мм) длина 30 см. - 1 шт.;
- Направитель проволоочный 0,032 дюйма (0,81 мм.) x 60 см. - 1 шт.;

- Syringe 5 ml. - 1 pc.;
- Injection cap - 3 pc.;
- Catheter clamp 8F - 1 pc.;
- Instructions for use - 1 pc.

3.16. Central venous catheter kit Shunmei Triple lumen, diameter 8,5 Fr (2,83 mm.) length 30 cm. consists of:

- Central venous catheter Triple lumen, diameter 8,5 Fr (2,83 mm) length 30 cm. - 1 pc.;
- Guide wire 0,032 inch (0,81 mm.) x 60 cm. - 1 pc.;
- Introducer needle 18Ga - 1 pc.;
- Dilator 9F x 10 cm. - 1 pc.;
- Scalpel- 1 pc.;
- Syringe 5 ml. - 1 pc.;
- Injection cap - 3 pc.;
- Catheter clamp 8F - 1 pc.;
- Instructions for use - 1 pc.

4. Central venous catheter kit Shunmei Shunmei Quad lumen in variants:

4.1. Central venous catheter kit Shunmei Quad lumen, diameter 8,5 Fr (2,83 mm.) length 15 cm. consists of:

- Central venous catheter Quad lumen, diameter 8,5 Fr (2,83 mm) length 15 cm. - 1 pc.;
- Guide wire 0,032 inch (0,81 mm.) x 60 cm. - 1 pc.;
- Introducer needle 18Ga - 1 pc.;
- Dilator 9F x 10 cm. - 1 pc.;
- Scalpel- 1 pc.;
- Syringe 5 ml. - 1 pc.;
- Injection cap - 4 pc.;
- Catheter clamp 8F - 1 pc.;

4.2. Central venous catheter kit Shunmei Quad lumen, diameter 8,5 Fr (2,83 mm.) length 20 cm. consists of:

- Игла интродьюсерная 18Ga - 1 шт.;
- Расширитель 9F x 10 см. - 1 шт.;
- Скальпель - 1 шт.;
- Шприц 5 мл. - 1 шт.;
- Колпачок инъекционный - 3 шт.;
- Фиксатор катетера 8F - 1 шт.;
- Инструкция по применению- 1 шт.

4. Наборы для катетеризации центральных вен Shunmei
четырёхпросветный в вариантах исполнения:

- 4.1. Набор для катетеризации центральных вен Shunmei
четырёхпросветный, диаметр 8,5 Fr (2,83 мм.) длина 15 см. в
составе:
- Катетер центральный венозный четырёхпросветный, диаметр 8,5 Fr (2,83 мм) длина 15 см. - 1 шт.;
 - Направитель проволоочный 0,032 дюйма (0,81 мм.) x 60 см. - 1 шт.;
 - Игла интродьюсерная 18Ga - 1 шт.;
 - Расширитель 9F x 10 см. - 1 шт.;
 - Скальпель - 1 шт.;
 - Шприц 5 мл. - 1 шт.;
 - Колпачок инъекционный - 4 шт.;
 - Фиксатор катетера 8F - 1 шт.;
 - Инструкция по применению- 1 шт.
- 4.2. Набор для катетеризации центральных вен Shunmei
четырёхпросветный, диаметр 8,5 Fr (2,83 мм.) длина 20 см. в
составе:
- Катетер центральный венозный четырёхпросветный, диаметр 8,5 Fr (2,83 мм) длина 20 см. - 1 шт.;
 - Направитель проволоочный 0,032 дюйма (0,81 мм.) x 60 см. - 1 шт.;
 - Игла интродьюсерная 18Ga - 1 шт.;
 - Расширитель 9F x 10 см. - 1 шт.;

- Central venous catheter Quad lumen, diameter 8,5 Fr (2,83 mm) length 20 cm. - 1 pc.;
 - Guide wire 0,032 inch (0,81 mm.) x 60 cm. - 1 pc.;
 - Introducer needle 18Ga - 1 pc.;
 - Dilator 9F x 10 cm. - 1 pc.;
 - Scalpel- 1 pc.;
 - Syringe 5 ml. - 1 pc.;
 - Injection cap - 4 pc.;
 - Catheter clamp 8F - 1 pc.;
 - Instructions for use - 1 pc.
- 4.3. Central venous catheter kit Shunmei Quad lumen, diameter 8,5 Fr (2,83 mm.) length 30 cm. consists of:
- Central venous catheter Quad lumen, diameter 8,5 Fr (2,83 mm) length 30 cm. - 1 pc.;
 - Guide wire 0,032 inch (0,81 mm.) x 60 cm. - 1 pc.;
 - Introducer needle 18Ga - 1 pc.;
 - Dilator 9F x 10 cm. - 1 pc.;
 - Scalpel- 1 pc.;
 - Syringe 5 ml. - 1 pc.;
 - Injection cap - 4 pc.;
 - Catheter clamp 8F - 1 pc.;
 - Instructions for use - 1 pc.

— Скальпель - 1 шт.; — Шприц 5 мл. - 1 шт.; — Колпачок инъекционный - 4 шт.; — Фиксатор катетера 8F - 1 шт.; — Инструкция по применению- 1 шт. 4.3. Набор для катетеризации центральных вен Shunmei четырехпросветный, диаметр 8,5 Fr (2,83 мм.) длина 30 см. в составе: — Катетер центральный венозный четырехпросветный, диаметр 8,5 Fr (2,83 мм) длина 30 см. - 1 шт.; — Направитель проволоочный 0,032 дюйма (0,81 мм.) x 60 см. - 1 шт.; — Игла интродьюсерная 18Ga - 1 шт.; — Расширитель 9F x 10 см. - 1 шт.; — Скальпель - 1 шт.; — Шприц 5 мл. - 1 шт.; — Колпачок инъекционный - 4 шт.; — Фиксатор катетера 8F - 1 шт.; — Инструкция по применению- 1 шт.	
Срок годности / срок эксплуатации Срок годности Набора для катеризации центральных вен Shunmei, подтвержденный Shunmei Medical, составляет три года. При соблюдении условий хранения описанных в инструкции Shunmei Medical гарантирует, что в течение трех лет после стерилизации Наборы для катеризации центральных вен Shunmei являются стерильными и все характеристики соответствуют требованиям стандарта продукта.	Shelf life / Service life The expiration date of CVC Kit confirmed by Shunmei Medical is three years, that is to say, when products are to be stored as instruction for use claimed, Shunmei Medical insures that within three years after sterilization, CVC Kit are sterile and all performances meet the requirements of product standard.
Порядок осуществления утилизации и уничтожения медицинского изделия Изделия, имевшие контакт с кровью и/или другими биологическими жидкостями, относится к классу Б классификации медицинских отходов, и подлежат утилизации и/или уничтожению согласно применяемым национальным законодательным нормам.	Disposal Products coming into contact with blood and/or biological fluids are class B medical devices under medical wastes classification and may be recycled and / or disposed in accordance with applicable national regulations.

Неиспользованные изделия (не имевшие контакта с кровью и/или с биологическими жидкостями), в т.ч. с истекшим сроком годности, относятся к классу А классификации медицинских отходов, подлежат утилизации и/или уничтожению согласно применяемым национальным законодательным нормам. (СанПиН 2.1.3684-21)

Unused products (not having contact with blood and/or biological fluids), including those with expired shelf life, belong to class A medical devices under medical waste classification and may be recycled and/or disposed in accordance with applicable national regulations. (SanPiN 2.1.3684-21)

Перечень национальных и международных нормативных документов/стандартов, которым соответствует медицинское изделие

List of international regulatory documents/standards which the medical device complies with

Таблица 12 Перечень национальных и международных нормативных документов/стандартов, которым соответствует медицинское изделие

Table 13 List of international regulatory documents/standards which the medical device complies with

№	Applicable standard code	Standards
1.	EN 556-1:2001/AC:2006	Требования к медицинским изделиям категории "СТЕРИЛЬНЫЕ"- Часть 1: Требования к медицинским изделиям, подлежащим финишной стерилизации
2.	EN 1041:2008+A1:2013	Изделия медицинские. Информация, предоставляемая изготовителем
3.	EN ISO 10993-1: 2009/AC:2010	Оценка биологического действия медицинских изделий– Часть 1: Оценка и тестирование в рамках процесса управления рисками
4.	EN ISO 10993-3: 2014	Оценка биологического действия медицинских изделий - Часть 3: Исследования генотоксичности, канцерогенности и токсического действия на репродуктивную функцию

№	Applicable standard code	Standards
1.	EN 556-1:2001/AC:2006	Sterilization of medical devices-Requirements for medical devices to be designated "STERILE"-Part 1:Requirements for terminally sterilized medical devices
2.	EN 1041:2008+A1:2013	Information supplied by the manufacturer of medical devices
3.	EN ISO 10993-1: 2009/AC:2010	Biological evaluation of medical devices – Part 1: Evaluation and testing within a risk management process
4.	EN ISO 10993-3: 2014	Biological evaluation of medical devices - Part 3: Tests for genotoxicity,carcinogenicity and reproductive toxicity
5.	EN ISO 10993-4: 2017	Biological evaluation of medical devices - Part 4: Selection of tests for interactions with blood
6.	EN ISO 10993-5: 2009	Biological evaluation of medical devices – Part 5: Tests for in vitro cytotoxicity
7.	EN ISO 10993-6: 2016	Biological evaluation of medical devices – Part 6: Tests for local

5.	EN ISO 10993-4: 2017	Оценка биологического действия медицинских изделий - Часть 4: Исследования изделий, взаимодействующих с кровью				effects after implantation
6.	EN ISO 10993-5: 2009	Оценка биологического действия медицинских изделий - Часть 5: Исследования на цитотоксичность: методы <i>in vitro</i>		8.	EN ISO 10993-7: 2008/AC:2009	Biological evaluation of medical devices - Part 7: Ethylene oxide sterilization residuals
7.	EN ISO 10993-6: 2016	Оценка биологического действия медицинских изделий - Часть 6: Исследования местного действия после имплантации		9.	EN ISO 10993-10: 2013	Biological evaluation of medical devices – Part 10: Tests for irritation and delayed-type hypersensitivity
8.	EN ISO 10993-7: 2008/AC:2009	Оценка биологического действия медицинских изделий - Часть 7: Остаточное содержание этиленоксида после стерилизации		10.	EN ISO 10993-11: 2018	Biological evaluation of medical devices - Part 11: Tests for systemic toxicity
9.	EN ISO 10993-10: 2013	Оценка биологического действия медицинских изделий - Часть 10: Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия		11.	EN ISO 10993-12: 2012	Biological evaluation of medical devices - Part 12: Sample preparation and reference materials
10.	EN ISO 10993-11: 2018	Оценка биологического действия медицинских изделий - Часть 11: Исследования общетоксического действия		12.	EN ISO 10993-18: 2020	Biological evaluation of medical devices - Part 18: Chemical characterization of materials
11.	EN ISO 10993-12: 2012	Оценка биологического действия медицинских изделий - Часть 12: Приготовление проб и контрольные образцы		13.	EN ISO 11135:2014	Sterilization of health care products - Ethylene oxide - Part 1: Requirements for development, validation and routine control of a sterilization process for medical devices
12.	EN ISO 10993-18: 2020	Оценка биологического действия медицинских изделий - Часть 18: Исследование химических свойств материалов		14.	EN ISO 11607-1:2020	Packaging for terminally sterilized medical devices - Part 1: Requirements for materials, sterile barrier systems and packaging systems
				15.	EN ISO 11607-2:2020	Packaging for terminally sterilized medical devices – Part 2: Validation requirements for forming, sealing and assembly processes
				16.	EN ISO 11737-1:2018	Sterilization of medical devices - Microbiological methods - Part 1: Determination of a population of

13.	EN ISO 11135:2014	Стерилизация медицинской продукции - Этиленоксид - Часть 1: Требования к разработке, валидации и текущему управлению процессом стерилизации медицинских изделий
14.	EN ISO 11607-1:2020	Упаковка для медицинских изделий, подлежащих финишной стерилизации- Часть 1: Требования к материалам, барьерным системам для стерилизации и упаковочным системам
15.	EN ISO 11607-2:2020	Упаковка для медицинских изделий, подлежащих финишной стерилизации- Часть 2: Требования к валидации процессов формирования, герметизации и сборки
16.	EN ISO 11737-1:2018	Стерилизация медицинских изделий- Микробиологические методы - Часть 1: Оценка популяции микроорганизмов на продукции
17.	EN ISO 11737-2:2009	Стерилизация медицинских изделий- Микробиологические методы - Часть 2: Испытания на стерильность, проводимые при валидации процессов стерилизации
18.	EN ISO 13485:2016	Изделия медицинские- Системы менеджмента качества- Требования для целей
17.	EN ISO 11737-2:2009	microorganisms on products Sterilization of medical devices - Microbiological methods - Part 2: Tests of sterility performed in the definition, validation and maintenance of a sterilization process
18.	EN ISO 13485:2016	Medical devices - Quality management systems - Requirements for regulatory purposes
19.	EN ISO 14155:2011	Clinical investigation of medical devices for human subjects - Good clinical practice
20.	EN ISO 14644-1:2015	Cleanrooms and associated controlled environments - Part 1: Classification of air cleanliness by particle concentration
21.	EN ISO 14644-2:2015	Cleanrooms and associated controlled environments - Part 2: Monitoring to provide evidence of cleanroom performance related to air cleanliness by particle concentration.
22.	EN ISO 14644-3:2005	Cleanrooms and associated controlled environments - Part 3: Test methods
23.	EN ISO 10555-1:2013/A1: 2017	Intravascular catheters – Sterile and single-use catheters – Part 1: General requirements
24.	EN ISO 10555-3:2013	Intravascular catheters – Sterile and single-use catheters – Part 3: Central venous catheters
25.	EN ISO 14971:2019	Medical devices - Application of risk management to medical

		регулирования			devices
19.	EN ISO 14155:2011	Клинические исследования медицинских изделий для людей - Надлежащая клиническая практика	26.	EN ISO 15223-1:2016	Medical devices-Symbols to be used with medical device labels, labelling and information to be supplied. Part 1:General requirements
20.	EN ISO 14644-1:2015	Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды- Часть 1: Классификация чистоты воздуха по концентрации частиц	27.	EN ISO 11070:2014/+A1:2018	Sterile single-use intravascular introducers, dilators and guidewires
21.	EN ISO 14644-2:2015	Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды- Часть 2: Текущий контроль для подтверждения постоянного соответствия чистоты воздуха по концентрации частиц.	28.	EN ISO 80369-1:2018	Small bore connectors for liquids and gases in healthcare applications - Part 1: General requirements
22.	EN ISO 14644-3:2005	Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды- Часть 3: Методы испытаний	29.	EN ISO 80369-7:2017	Small-bore connectors for liquids and gases in healthcare applications – Part 7: Connectors for intravascular or hypodermic applications
23.	EN ISO 10555-1:2013/A1: 2017	Катетеры внутрисосудистые стерильные однократного применения- Часть 1: Общие технические требования	30.	EN ISO 7864:2016	Sterile hypodermic needles for single use – Requirements and test methods
24.	EN ISO 10555-3:2013	Катетеры внутрисосудистые стерильные однократного применения- Часть 3: Катетеры венозные центральные	31.	AAMI TIR42:2010	Evaluation of particulates associated with vascular medical devices
25.	EN ISO 14971:2019	Изделия медицинские - Применение менеджмента риска к медицинским изделиям	32.	ASTM F640-12	Standard Test Methods for Determining Radiopacity for Medical Use
			33.	BS 2982:1992	Specification for materials and packaging of surgical scalpels with detachable blades
			34.	EN ISO 8536-4:2013/A1:2013	Infusion equipment for medical use – Part 4: Infusion sets for single use, gravity feed
			35.	EN ISO 9626:2016	Stainless steel needle tubing for the manufacture of medical devices – Requirements and test

26.	EN ISO 15223-1:2016	Изделия медицинские - Символы, применяемые при маркировании медицинских изделий, на этикетках и в сопроводительной документации. Часть 1: Основные требования	
	27.	EN ISO 11070:2014/+A1:2018	Интродьюсеры однократного применения стерильные, расширители и направители проволоочные
	28.	EN ISO 80369-1:2018	Разъемы малого диаметра для жидкостей и газов, используемые в медицине – Часть 1: Общие требования
	29.	EN ISO 80369-7:2017	Разъемы малого диаметра для жидкостей и газов, используемые в медицине – Часть 7: Разъемы для внутрисосудистых или подкожных применений
	30.	EN ISO 7864:2016	Иглы инъекционные однократного применения стерильные-Требования и методы испытаний
	31.	AAMI TIR42:2010	Оценка твердых частиц, связанных с сосудистыми медицинскими устройствами
	32.	ASTM F640-12	Стандартные методы испытаний для определения рентгеноконтрастности для медицинского применения
	33.	BS 2982:1992	Характеристики на материалы и упаковку хирургических скальпелей со съёмными

		methods
36.	ASTM F 1980-16	Standard Guide for Accelerated Aging of Sterile Barrier Systems for Medical Devices
37.	ASTM D 4169-16	Standard Practice for Performance Testing of Shipping Containers and Systems
38.	EN ISO 780:2015	Packaging -- Distribution packaging -- Graphical symbols for handling and storage of packages
39.	ISO 2859-1:1999	Sampling procedures for inspection by attributes -- Part 1: Sampling schemes indexed by acceptance quality limit (AQL) for lot-by-lot inspection
40.	MEDDEV 2.7/1 Rev.4	Clinical evaluation: a guide for manufacturers and notified bodies under directives 93/42/EEC and 90/385/EEC
41.	NBOG 2010-1 2010	Guidance for Notified Bodies auditing suppliers to medical device manufacturers
42.	MEDDEV 2.12-2 rev.2 2012	Post market clinical follow-up studies: A guide for manufactures and notified bodies
43.	MEDDEV 2,12-1 rev.8 2013	Guidelines on a medical devices vigilance system
44.	MDD 93/42/EEC	Medical Device Directive: Council Directive 93/42/EEC concerning medical devices, including all amendments

			лезвиями		
34.	EN ISO 8536-4:2013/A1:2013	Инфузионное оборудование для медицинского применения - Часть 4: Инфузионные наборы для одноразового использования, гравитационная подача			
35.	EN ISO 9626:2016	Трубки игольные из нержавеющей стали для изготовления медицинских изделий- Требования и методы испытаний			
36.	ASTM F 1980-16	Стандартное руководство по ускоренному старению стерильных барьерных систем для медицинских устройств			
37.	ASTM D 4169-16	Стандартная практика тестирования производительности Транспортных контейнеров и систем			
38.	EN ISO 780:2015	Упаковка – Дистрибьюторская упаковка - Графические символы для обработки и хранения упаковок			
39.	ISO 2859-1:1999	Процедуры отбора проб для проверки соответствия - Часть 1: Схемы отбора проб, индексированные по предельному качеству приемки (AQL) для проверки по партиям			
40.	MEDDEV 2.7/1 Rev.4	Клиническая оценка: руководство для производителей и уполномоченных органов в соответствии с директивами			

		93/42/ЕЕС и 90/385/ЕЕС	
41.	NBOG 2010-1 2010	Руководство для уполномоченных органов, проводящих аудит поставщиков для производителей медицинского оборудования	
42.	MEDDEV 2.12-2 rev.2 2012	Клинические исследования следующие после маркетинга: руководство для производителей и уполномоченных органов	
43.	MEDDEV 2.12-1 rev.8 2013	Рекомендации по системе контроля за медицинскими устройствами	
44.	MDD 93/42/ЕЕС	Директива по медицинскому оборудованию: Директива Совета 93/42/ЕЕС, касающаяся медицинских устройств, включая все поправки	
Гарантийные обязательства			Warranty
Неприменимо			Not applicable
Рекламация			Reclamation
ООО "ЦЕНТР ИЗУЧЕНИЯ СИСТЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ" Телефон: +7 (499) 391-24-14; +7 (926) 287-96-65 Электронный адрес: office@hscmail.pro Юридический адрес: 127473, город Москва, улица Селезневская, д. 11А, стр. 2, эт/ком/оф 2/30,32/232			LLC " HEALTHCARE SYSTEMS CENTER" Telephone: office@hscmail.pro Email address: office@hscmail.pro Legal address: 127473, Moscow, Seleznevskaya st, 11A, building 2, office 403, 508
Расшифровка символов, применяемых при маркировке медицинского изделия			Explanation of symbols used in labelling the medical device
Первичная упаковка содержит следующую информацию: - наименование МИ; - логотип Shunmei; - состав упаковки; - номер по каталогу; - код партии;			Primary package contain following information: - name of MD; - Shunmei logo; - package composition; - reference number; - lot number;

- использовать до; - дата изготовления; - символ "Запрет на повторное применение"; - символ "Не использовать при повреждении упаковки"; - символ «Осторожно! Обратитесь к инструкции по применению»; - символ «Обратитесь к инструкции по применению»; - изготовитель; - символ "Не допускать воздействия солнечного света" - символ "Температурный диапазон"; - QR-код; - Штрих-код; - Предупреждения и меры предосторожности; - Условия хранения; - символ "Апирогенно"; - символ "Стерилизация оксидом этилена"; - символ "Беречь от влаги"; - символ " Не стерилизовать повторно"; - Уполномоченный представитель в Европейском сообществе; - CE символ. Вторичная упаковка содержит следующую информацию: - наименование МИ; - логотип Shunmei; - состав упаковки; - количество в упаковке; - номер по каталогу; - код партии; - использовать до; - дата изготовления; - символ "Запрет на повторное применение"; - символ "Не использовать при повреждении упаковки"; - символ «Осторожно! Обратитесь к инструкции по применению»; - символ «Обратитесь к инструкции по применению»; - изготовитель; - символ "Не допускать воздействия солнечного света" - символ "Температурный диапазон"; - QR-код; - Штрих-код; - символ "Апирогенно";	- use before; - date of manufacture; - symbol "do not reuse"; - symbol "Do not use if package is damage"; - symbol «Caution! Refer to the instructions for use»; - symbol «Refer to the instructions for use»; - name of manufacturer and address; - symbol "Keep away from sunlight" - symbol "Temperature range"; - QR-code; - Barcode; - Warnings and precautions; - Storage conditions; - symbol «Apyrogenic»; - symbol «Sterilization ethylene oxide »; - symbol «Keep dry»; - symbol «Do not re-sterilize »; - Authorized representative in the European Community; - CE symbol. Secondary package contain following information: - name of MD; - Shunmei logo; - package composition; - quantity in the package; - reference number; - lot number; - use before; - date of manufacture; - symbol "do not reuse"; - symbol "Do not use if package is damage"; - symbol «Caution! Refer to the instructions for use»; - symbol «Refer to the instructions for use»; - name of manufacturer and address; - symbol "Keep away from sunlight" - symbol "Temperature range"; - QR-code; - Barcode; - symbol «Apyrogenic»;
---	---

- символ "Стерилизация оксидом этилена"; - символ "Беречь от влаги"; - символ " Не стерилизовать повторно"; - Уполномоченный представитель в Европейском сообществе; - CE символ. Третичная упаковка содержит следующую информацию: - наименование МИ; - логотип Shunmei; - состав упаковки; - количество в упаковке; - номер по каталогу; - код партии; - использовать до; - дата изготовления; - символ "Запрет на повторное применение"; - символ "Не использовать при повреждении упаковки"; - символ «Осторожно! Обратитесь к инструкции по применению»; -- - символ «Обратитесь к инструкции по применению»; - изготовитель; - символ "Не допускать воздействия солнечного света" - символ "Температурный диапазон"; - QR-код; - Штрих-код; - символ "Апирогенно"; - символ "Стерилизация оксидом этилена"; - символ "Беречь от влаги"; - символ " Не стерилизовать повторно"; - Уполномоченный представитель в Европейском сообществе; - CE символ.	- symbol «Sterilization ethylene oxide »; - symbol «Keep dry»; - symbol «Do not re-sterilize»; - Authorized representative in the European Community; - CE symbol. Tertiary package contain following information: - name of MD; - Shunmei logo; - package composition; - quantity in the package; - reference number; - lot number; - use before; - date of manufacture; - symbol "do not reuse"; - symbol "Do not use if package is damage"; - symbol «Caution! Refer to the instructions for use»; - symbol «Refer to the instructions for use»; - name of manufacturer and address; - symbol "Keep away from sunlight" - symbol "Temperature range"; - QR-code; - Barcode; - symbol «Apyrogenic»; - symbol «Sterilization ethylene oxide »; - symbol «Keep dry»; - symbol «Do not re-sterilize»; - Authorized representative in the European Community; - CE symbol.
Дата выпуска или пересмотра инструкции	Date of issue or revision of instructions
27.06.2023	27.06.2023

СЕРТИФИКАТ

/ЛОГОТИП/
СКРМТ

Совет Китая по развитию международной торговли - Китайская палата международной торговли

01708625



**Совет Китая по развитию международной торговли
Китайская палата международной торговли**

QR-код

СЕРТИФИКАТ

№ 234403A0/032369

/Печать:
СОВЕТ КИТАЯ ПО РАЗВИТИЮ
МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ
СЕРТИФИКАТ
СКРМТ
(24)

НАСТОЯЩИМ УДОСТОВЕРЯЕТСЯ, ЧТО: печать компании «Шунмей Медикал Ко. Лтд» (Shunmei Medical Co. Ltd) на прилагаемой ДЕКЛАРАЦИИ является подлинной.

/Печать:
СКРМТ
СЕРТИФИКАТ

Совет Китая по развитию международной
торговли

/Печать:
СОВЕТ КИТАЯ ПО РАЗВИТИЮ
МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ
СЕРТИФИКАТ
СКРМТ
(24)

/подпись/

Уполномоченный представитель: Чжоу
Сиюань (Zhou Siyuan)

Дата: 30 июня 2023 г.

Веб-сайт для проверки сертификата: <http://www.rzccpit.com/validate.html>

**/Логотип: "Шунмей"
(Shunmei®)**

«ШУНМЕЙ МЕДИКАЛ Ко., Лтд.» (SHUNMEI MEDICAL Co., Ltd.)

Адрес: R401 здания В, № 8 1-й дороги Цзиньлун, промышленная зона Баолун, район Лунган, Шэньчжэнь 518116, Гуандун, Китай (R401 of Building B, No. 8 of 1st Jinlong road, Baolong Industrial Zone, Longgang District, Shenzhen 518116, Guangdong, China)

Тел.: +86 0752-3306949

Эл. почта: nora@shunmed.com Веб-сайт: www.shunmed.com

Декларация

Изделие: Набор для катетеризации центральных вен Shunmei в вариантах исполнения

Документ: Инструкция по применению

Документ в конечном итоге будет передан в «Healthcare Center, LLC», который используется для конечной регистрации набора для катетеризации центральных вен Shunmei в вариантах исполнения в России.

Мы, «Шунмей Медикал Ко. Лтд» (Shunmei Medical Co., Ltd), настоящим заявляем, что информация, представленная на титульном листе документа, верна.

«Шунмей Медикал Ко. Лтд» (Shunmei Medical Co., LTD)

Должность: Генеральный директор

Подпись: Ту Чжэньцзинь (Tu Zhenjin)

Дата: 29.06.2023 г.

/Печать:

«ШУНМЕЙ МЕДИКАЛ КО. ЛТД. (SHUNMEI MEDICAL CO., LTD)» * ШЭНЬЧЖЭНЬ,
КИТАЙ

/Печать:

СОВЕТ КИТАЯ ПО РАЗВИТИЮ
МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ
СЕРТИФИКАТ
СКРМТ
(24)

Согласовано

**«ШУНМЕЙ МЕДИКАЛ Ко., Лтд.» (SHUNMEI
MEDICAL Co., Ltd.)**

Организация

**R401 здания В, № 8 1-й дороги Цзиньлун,
Промышленная зона Баолун, район Лунган,**

Шэньчжэнь

**518116, Гуандун, Китай (R401 of Building B, No. 8 of
1st Jinlong road, Baolong Industrial Zone, Longgang
District, Shenzhen 518116, Guangdong, China).**

Адрес

Генеральный директор

Должность

Ту Чжэньцзинь

Фамилия, имя

27.06.2023

Дата /ДД.ММ.ГГГГ

/подпись/

Подпись

/Печать:

**«ШУНМЕЙ МЕДИКАЛ КО. ЛТД. (SHUNMEI
MEDICAL CO., LTD)» * ШЭНЬЧЖЭНЬ, КИТАЙ**

Инструкция по применению

Набор для катетеризации центральных вен Shunmei в вариантах исполнения

Инструкция по применению

Набор для катетеризации центральных вен Shunmei в вариантах исполнения

2023

/Печать:


СОВЕТ КИТАЯ ПО РАЗВИТИЮ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ

СЕРТИФИКАТ

СКРМТ

(24)

Перевод данного текста выполнен переводчиком Котляровым Антоном Игоревичем.

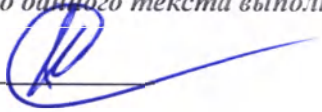

Российская Федерация

Город Москва

Двадцать первого июля две тысячи двадцать третьего года.

Я, Корсик Владимир Константинович, нотариус города Москвы, свидетельствую подлинность подписи переводчика, Котлярова Антона Игоревича.

Подпись сделана в моем присутствии.

Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: № 77/2138-н/77-2023- 26-1826

Уплачено за совершение нотариального действия: 400 руб. 00 коп.



Всего пронумеровано, пронумеровано
и скреплено печатью 50 лист(а)(ов)

Нотариус



В. К. Корсик

