

КОПИЯ

ПОДТВЕРЖДАЮ
точность, достоверность и правильность

Тим Тай,
Президент
Мекспо Интернешил Инк.

2828 Faber Street
Union City,
CA 94587,
USA

MEXPO INTERNATIONAL INC.



Authorized Signatures

Тел.: +1 (510) 489-6800

Факс: +1 (510) 489-3111

<http://www.blossom-disposables.com>

blossomglo@aol.com

tim@mexpo-glove.com

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ДОКУМЕНТ **МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

ПЕРЧАТКИ МЕДИЦИНСКИЕ СМОТРОВЫЕ (ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ)
ПОЛИХЛОРОПРЕНОВЫЕ НЕСТЕРИЛЬНЫЕ BLOSSOM,
НЕАНАТОМИЧЕСКИЕ, НЕОПУДРЕННЫЕ, В ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ:
ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ (НА ОБЕ РУКИ), ЦВЕТ: РОЗОВЫЙ; РАЗМЕРЫ: XS, S, M, L, XL
ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ (НА ОБЕ РУКИ), ЦВЕТ: ЛАЙМОВЫЙ-ЗЕЛЕНЫЙ; РАЗМЕРЫ: XS, S, M, L, XL

Оглавление

1. Наименование медицинского изделия.....	3
2. Описание медицинского изделия.....	4
3. Состав медицинского изделия.....	5
4. Описание принципа работы.....	6
5. Назначение	7
6. Показания к применению.....	8
7. Противопоказания	9
8. Возможные побочные действия и осложнения	10
9. Меры предосторожности при применении	11
10. Область применения	12
11. Способ (порядок) применения.....	13
12. Условные обозначения и маркировка	14
13. Основные технические характеристики	16
14. Условия применения (температура, влажность, давление)	18
15. Условия хранения	19
16. Условия транспортировки.....	20
17. Упаковка изделия и комплект поставки	21
18. Перечень исполнений медицинского изделия (номенклатура).....	22
19. Требования безопасного уничтожения и утилизации	23
20. Срок годности.....	24
21. Производитель.....	25
22. Гарантийные обязательства	26
23. Уполномоченный представитель производителя в РФ и служба потребителей	27

1. Наименование медицинского изделия

Перчатки медицинские смотровые (диагностические) полихлоропреновые нестерильные Blossom, неанатомические, неопудренные, в вариантах исполнения:

- текстурированные (на обе руки), цвет: розовый; размеры: XS, S, M, L, XL;
- текстурированные (на обе руки), цвет: лаймовый-зеленый; размеры: XS, S, M, L, XL.

2. Описание медицинского изделия

Перчатки медицинские смотровые (диагностические) полихлоропреновые нестерильные Blossom, неанатомические, неопудренные, в вариантах исполнения (далее в настоящем документе – «перчатки диагностические полихлоропреновые Blossom» или «перчатки») представляют собой основное средство для защиты рук медицинского персонала, обязательны при всех медицинских манипуляциях. Используются как двусторонний барьер для защиты, как пациента, так и персонала от различной контаминации. Перчатки смотровые (диагностические) применяются как непосредственно при контакте с пациентом (осмотр, забор крови, лабораторные исследования и т.п.), так и при выполнении санитарно-гигиенических работ. Изделие одноразовое.

Перчатки поставляются в разных цветах: розовый, лаймовый-зеленый и в разных размерах:

XS – очень маленький,

S – маленький,

M – средний,

L – большой,

XL – очень большой.

Материал полихлоропрен обеспечивает, с одной стороны, удобство ношения, которым обладают перчатки из натурального каучука, с другой стороны – защиту и прочность, которая свойственна только перчаткам из синтетических материалов, например, нитрила.



Рис. 1. Перчатки диагностические полихлоропреновые



Рис. 2. Пример упаковки перчаток диагностических полихлоропреновых

Медицинское изделие разработано и изготовлено таким образом, чтобы в предусмотренных условиях эксплуатации его функциональные характеристики соответствовали нормативным требованиям и применимым стандартам. Соответствующее изделие (полихлоропреновые диагностические перчатки) подходит для обеих рук и выпускается в различных размерах в соответствии с требованиями Стандартной спецификации на полихлоропреновые диагностические перчатки для применения в медицине Американского общества по испытанию материалов АОИМ D 6977 (ASTM D 6977) и / или по желанию заказчиков.

3. Состав медицинского изделия

Таблица 1. Состав перчаток диагностических полихлоропреновых

№	Химический состав	Номер CAS	Масс %	Наименование производителя	Страна производства
1	Полихлоропрен – полимер из синтетического каучука	9010-98-4	94,00	PT. MediSafe Technologies	Индонезия
2	Стерически затруднённый полимерный фенол	68610-51-5	0,75	PT. MediSafe Technologies	Индонезия
3	Оксид цинка	1314-13-2	1,00	PT. MediSafe Technologies	Индонезия
4	Тиокарбонат	136-23-2	1,00	PT. MediSafe Technologies	Индонезия
5	Сера	7704-34-9	1,00	PT. MediSafe Technologies	Индонезия
6	Диоксид титана	13463-67-7	1,00	PT. MediSafe Technologies	Индонезия
7	Восковая эмульсия	63231-60-7 64742-61-6 64742-51-4	0,40	PT. MediSafe Technologies	Индонезия
8	Гидроксид калия	1310-58-3	0,50	PT. MediSafe Technologies	Индонезия
9	Лаймовый-зеленый пигмент категории EN -71 ⁽¹⁾	1328-53-6	0,35	PT. MediSafe Technologies	Индонезия
9	Розовый пигмент категории EN -71 ⁽²⁾	5280-68-2	0,35	PT. MediSafe Technologies	Индонезия
ВСЕГО			100,00		
(1) Только для перчаток лаймового-зелёного цвета					
(2) Только для перчаток розового цвета					

4. Описание принципа работы

Перчатки медицинские смотровые (диагностические) полихлоропреновые предназначены для защиты пациента и медицинского работника от взаимного заражения во время проведения различных процедур. Используются в качестве защитного барьера при ношении на руках медицинских работников во время обследования/лечения пациента или других санитарных целей. Предназначены для защиты рук медицинского персонала и пациентов от загрязнений.

5. Назначение

Перчатки медицинские предназначены для использования в качестве двухстороннего барьера для защиты пациента и персонала от загрязнений, заражений и обладают повышенной противоскользящей поверхностью при проведении медицинских осмотров, процедур с целью диагностики и лечения пациента или для других санитарных целей.

6. Показания к применению

- проведение медицинских осмотров, процедур с целью диагностики и лечения, а также манипуляций с загрязненным медицинским материалом;
- возможный контакт с кровью;
- контакт с семенной жидкостью или цервикальным секретом;
- контакт со слизистыми оболочками носа, рта, половых органов и прямой кишки;
- контакт с какой-либо биологической жидкостью, независимо от наличия в ней крови;
- контакт с предметами или материалами, загрязненными кровью или другими биологическими жидкостями или химикатами;
- при любом нарушении целостности кожи медицинского персонала или пациента;
- возможный контакт с постельными принадлежностями пациента;
- лабораторные исследования.

Перчатки смотровые должны быть устойчивы к воздействию крови, семенной жидкости, цервикальному секрету, другими биологическими жидкостями, к химикатам.

7. Противопоказания

Аллергические реакции. Перчатки содержат компоненты, которые могут вызвать аллергическую реакцию у некоторых лиц.

В случае аллергической реакции / контактного дерматита на продукт, немедленно прекратить использование и обратиться к врачу.

8. Возможные побочные действия и осложнения

Внимание! Эти изделия изготовлены из синтетического каучука и могут содержать остатки химических соединений, используемых при производстве, что может приводить к возникновению аллергической реакции у некоторых людей. Если в процессе использования изделия возникла аллергическая реакция, немедленно прекратите использование и проконсультируйтесь с врачом.

9. Меры предосторожности при применении

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! Не используйте это изделия, если у Вас есть подтвержденная аллергия к какому-либо из компонентов. Если в процессе использования изделия возникла аллергическая реакция, немедленно прекратите использование и обратитесь за медицинской помощью.

- Безопасное использование данных перчаток лицами, чувствительными к латексу, не предусмотрено. Возможны отдельные случаи аллергических реакций на латекс или пудру.

- Все манипуляции, при которых может произойти загрязнение рук кровью или сывороткой, химикатами, производить в перчатках;

- Все повреждения на руках закрывать лейкопластырем, водонепроницаемыми повязками;

- В случае повреждения перчатки(ок) и загрязнения кожи кровью необходимо обработать кожные покровы настолько быстро, насколько позволяет безопасность пациента, для этого необходимо:

- *Снять перчатки*

- *Обработать кожу тампоном, смоченным 70% спиртом;*

- *Вымыть водой с мылом и вытереть салфеткой;*

- *Повторно обработать 70% спиртом.*

10. Область применения

Медицинские лечебно-профилактические учреждения.

11. Способ (порядок) применения

Этапы надевания перчаток

- Обработать руки.
- Открыть коробку и достать пару перчаток.
- Взять одну из перчаток, встряхнуть, чтобы она расправилась.
- Затем либо при помощи кого-то, либо самим, надеть правую перчатку, так чтобы она плотно села на руку.
- Те же действия повторить и с перчаткой для левой руки.
- Когда перчатки надеты на обе руки, их можно поправить без риска загрязнения.

Этапы снятия перчаток

- Сделать отворот на левой перчатке пальцами правой руки, касаясь только наружной стороны (предупреждается загрязнение кожи предплечья или рукавов халата, если перчатки покрывают нижнюю часть рукавов халата).
- Снять перчатку с левой руки, выворачивая ее наизнанку и держа за отворот. Держите ее в правой руке (предупреждается загрязнение окружающей среды).
- Взять правую перчатку левой рукой за отворот с внутренней стороны (предупреждается загрязнение левой руки).
- Снять перчатку с правой руки, выворачивая ее наизнанку: левая перчатка оказалась в середине правой (предупреждается загрязнение окружающей среды, обеспечивается инфекционная безопасность).
- Положить перчатки в дезраствор (предупреждается распространение микроорганизмов в окружающей среде).
- Утилизировать. Утилизация перчаток производится при помощи пакетов, мешков и контейнеров, как и утилизация перевязочного материала, после предварительного обеззараживания. При выборе способа их уничтожения необходимо отталкиваться от типа материала. Натуральные латексные перчатки не рекомендуется сжигать, так как при создании неправильных условий при сжигании могут образовываться токсичные вещества (диоксид серы).

12. Условные обозначения и маркировка

Упаковка и маркировка изделия содержит следующую обязательную информацию:

- наименование изделия (наименование модели, код, артикул);
- наименование страны-изготовителя;
- наименование и юридический адрес изготовителя;
- размер;
- сведения о документе, в соответствии с которым изготовлены перчатки;
- Внимание! Не используйте эти перчатки в случае подтвержденной аллергии на химические компоненты. Обязательно проконсультируйтесь со специалистом перед применением;
- Условия хранения: хранить в сухом месте при температуре 5–40°C;
- код партии (LOT);
- не содержит латекс;
- не использовать повторно;
- дата изготовления
- подлежит раздельной утилизации
- температурный диапазон
- не стерильно
- срок годности
- знак сертификации европейского союза
- информация о службе потребителей;
- номер и дата РУ.

Макет маркировки изделия приведен на рис. 3.

Дизайн потребительской упаковки для перчаток диагностических полихлоропреновых Blossom приведен на рис. 4.

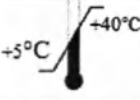
 Mexpo International Inc., USA Мекспо Интернешнл Инк., США 2828 Faber Street Union City, CA 94587, USA Уполномоченный представитель на территории РФ: ООО «БЛОССОМ» Россия, 198188, г. Санкт-Петербург, ул. Возрождения, д. 7/25, литера А, кв. 81 info@blossomspb.ru		Перчатки медицинские смотровые (диагностические) полихлоропреновые нестерильные Blossom, неанатомические, неопудренные 100 штук / 50 пар Размер: XL Цвет: лаймовый-зеленый	
Транспортировать при температуре от -40 до +40°C и атмосферном давлении от 750-770 мм рт. ст. с относительной влажностью 25-75% не более 72 ч. Примечание: после транспортировки при отрицательных температурах стабилизировать как минимум 24 часа при комнатной температуре перед использованием		LOT	908069044
			08.2019
Хранить в крытых помещениях при температуре от +5 до +40°C и атмосферным давлением от 750 до 770 мм рт. ст. с относительной влажностью от 45 до 95%			 Срок годности: 5 лет с даты производства
Регистрационное удостоверение №		     	
Blossom			

Рис. 3 Макет маркировки изделия

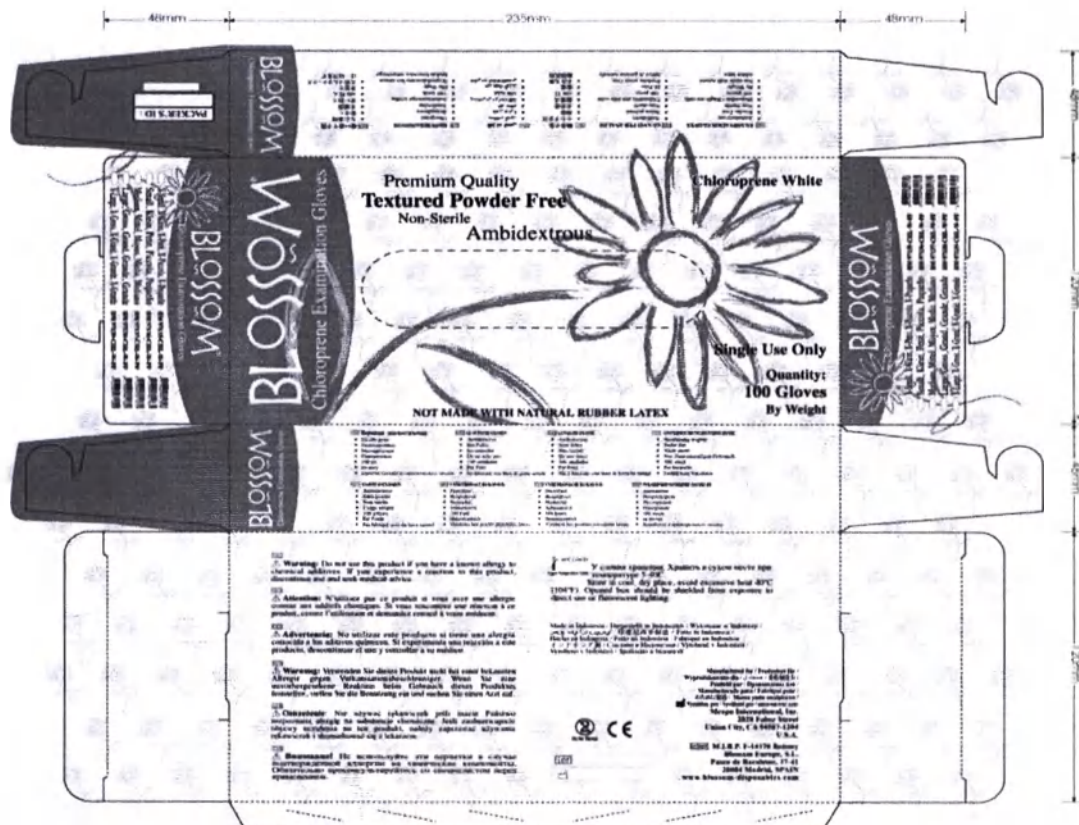


Рис. 4. Дизайн потребительской упаковки для перчаток диагностических полихлоропропеновых нестерильных, неанатомической формы, одноразовых неопудренных торговой марки

13. Основные технические характеристики

Перчатки медицинские смотровые (диагностические) полихлоропреновые нестерильные Blossom, неанатомические, неопудренные, в вариантах исполнения:

- текстурированные (на обе руки), цвет: розовый; размеры: XS, S, M, L, XL;
- текстурированные (на обе руки), цвет: лаймовый-зеленый; размеры: XS, S, M, L, XL.

Данное изделие изготовлено из полихлоропренового каучука с помощью формования методом непрерывного окунания.

Таблица 2. Габаритные Размеры

Размер	Минимальная длина (мм)	Ширина (мм)	Толщина в области манжеты, ладони и пальцев
Очень малый (extra small)	≥ 240	≤ 80	Мин. 0,05 мм для всех размеров
Малый (small)	≥ 240	80 ± 10	
Средний (medium)	≥ 240	95 ± 10	
Большой (large)	≥ 240	110 ± 10	
Очень большой (extra large)	≥ 240	≥ 110	

Таблица 3. Размеры перчаток

Физические параметры					
Размер	XS	S	M	L	XL
Ширина ладони (D), ± 4 мм	76	86	95	106	115
Толщина, $\pm 0,02$ мм					
Ладонь (центр), мм	0,20				
Палец, мм	0,10				
Масса, $\pm 0,3$ г	4,0				
Длина, ± 5 мм	245				

Таблица 4. Требования к прочности и герметичности

Критерии приемлемости	План выборки	Уровень контроля	ДУК	Размер выборки
Не более 2 мг/перчатка	Выборка из нормальной совокупности (однократная нормальная выборка)	Н/П	Н/П	5 шт.

Таблица 5. Требования к прочности и герметичности

№ п/п	Наименование медицинского изделия	Требования к прочности	Требования к герметичности
1	Перчатки медицинские смотровые (диагностические) полихлоропреновые нестерильные Blossom, неанатомические, неопудренные	до ускоренного старения: усилие при разрыве: не менее 7,5 Н, удлинение при разрыве: не менее 700%, после ускоренного старения: усилие при разрыве: не менее 6,5 Н, удлинение при разрыве: не менее 500%	при наполнении перчатки водой объемом 1000 мл не должно наблюдаться утечки воды



Рис. 5. Габаритные размеры перчаток диагностических полихлоропреновых

Таблица 6. Функциональные характеристики перчаток диагностических полихлоропреновых

Характеристика	Значение	
	До ускоренного старения	После ускоренного старения
Минимальное усилие на разрыв, Н	≥ 7	≥ 6
Минимальная прочность на разрыв, МПа	≥ 14	≥ 14
Максимальное удлинение, %	≥ 700	≥ 450

14. Условия применения (температура, влажность, давление)

Условия применения:

- Температура: $(+5 \dots +40 \pm 1) ^\circ\text{C}$;
- Относительная влажность: $(45-95 \pm 2) \%$;
- Атмосферное давление: 760 ± 10 мм рт.ст.

15. Условия хранения

Условия хранения:

- температура: $(+5...+40 \pm 1) ^\circ\text{C}$;
- относительная влажность: $(45-95 \pm 2) \%$;
- атмосферное давление: 760 ± 10 мм рт. ст.

Изделие должно храниться только в оригинальной упаковке.

Изделие должно храниться в прохладном сухом помещении вдали от попадания прямых солнечных лучей. Температура не должна превышать $+40 ^\circ\text{C}$.

Вскрытую упаковку следует защищать от воздействия прямых солнечных лучей или флуоресцентного освещения.

Помещения для хранения должны быть оснащены устройствами контроля и регуляции температуры и влажности.

16. Условия транспортировки

Температура	Относительная влажность	Атмосферное давление	Период времени
-40...+40 °С	25–75 %	760 ± 10 мм рт. ст.	Не более 72 ч

Примечание: после транспортировки при отрицательных температурах стабилизировать как минимум 24 часа при комнатной температуре перед использованием

Транспортирование любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Транспортные средства должны обеспечить защиту от вредного влияния условий погоды, солнечных лучей, повреждений и загрязнений. Грузовые машины должны быть чистыми, сухими, без механических повреждений, свободны от чужого запаха. Загрузка и разгрузка должны состояться в условиях, обеспечивающих защиту от влияния условий погоды. Запрещается тянуть, бросать и катать транспортную упаковку. Рекомендуется укладывать транспортную упаковку таким образом, чтобы предотвратить передвижение или повреждение её, и вследствие этого помятие во время транспортирования.

17. Упаковка изделия и комплект поставки

Перчатки диагностические полихлоропреновые Blossom упаковываются следующим образом:

100 перчаток по весу упаковываются в потребительскую упаковку (картонная коробка) (см. рис. 3, 4), затем 10 коробок упаковываются в картонный ящик. Описание упаковочных материалов приведено в таблице 7 ниже.

Таблица 7. Упаковочные материалы перчаток диагностических полихлоропреновых

Упаковка	Материал	Примечание
Потребительская упаковка (картонная коробка)	картон односторонний (с серым оборотом)	400 г/м ²
Картонный ящик	W175/175 ABF (M150)	W – Основание – белый картон 175/175 – Многослойный картон ABF – A+B Flute – с двойными стенками А и В M150 – основание 150

18. Перечень исполнений медицинского изделия (номенклатура)

Таблица 10. Перечень исполнений перчаток диагностических полихлоропреновых

Перчатки диагностические полихлоропреновые BLOSSOM		
Размер	Цвет	
	Розовый	Лаймовый-зеленый
		
XS	BM 97715-CHL-P-PF	BM 97325-CHL-LG-PF
S	BM 97716-CHL-P-PF	BM 97326-CHL-LG-PF
M	BM 97717-CHL-P-PF	BM 97327-CHL-LG-PF
L	BM 97718-CHL-P-PF	BM 97328-CHL-LG-PF
XL	BM 97719-CHL-P-PF	BM 97329-CHL-LG-PF

19. Требования безопасного уничтожения и утилизации

Перчатки диагностические полихлоропреновые Blossom являются изделиями однократного применения.

Перчатки диагностические полихлоропреновые Blossom должны утилизироваться после использования, истечения срока годности, а также в случае повреждения упаковки и невозможности использовать изделия по назначению.

Утилизация осуществляется в соответствии с требованиями действующих Санитарных Правил и Норм Российской Федерации по обращению с медицинскими отходами В соответствии с СанПиН 2.1.3684.

20. Срок годности

5 лет с даты изготовления.

21. Производитель

Mexpo International Inc.

Corporate Address:

2828 Faber Street

Union City, CA 94587

USA

Tel.: +1 (510) 489-6800

Fax: +1 (510) 489-3111

<http://www.blossom-disposables.com>

blossomglo@aol.com

tim@mexpo-glove.com

Место производства медицинского изделия

PT. MediSafe Technologies, Indonesia

Jl. Batang Kuis gg. Tambak Rejo/Pasar IX Desa Buntu Bedimbar, Tanjung Morawa Medan -
20362, Sumatera Utara Indonesia

22. Гарантийные обязательства

Компания Мекспо Интернешнл Инк. (Mexpro International Inc.), США (USA) гарантирует, что данное изделие было произведено и упаковано в соответствии с положениями Директивы ЕС 93/42/ЕЭС по медицинским изделиям. Каждая партия продукции была проверена перед отправкой потребителю. Компания Мекспо Интернешнл Инк. производит замену изделия, если изъят или брак связан с производственным процессом или упаковкой, о чем компания Мекспо Интернешнл Инк. или ее дистрибьюторы должны быть немедленно проинформированы.

Настоящая гарантия действительна в рамках всех положений гарантийного обслуживания и законодательства об ответственности изготовителя за качество продукции. Гарантия действует только в указанном выше объеме. Любые другие претензии на гарантийное обслуживание исключаются. Данная гарантия и упомянутые правовые требования заменяют любые другие гарантийные обязательства, устные или письменные, явные или предполагаемые, со стороны компании Мекспо Интернешнл Инк. Ввиду многочисленных факторов, находящихся вне зоны контроля компании Мекспо Интернешнл Инк. таких как транспортировка, хранение, обращение со стороны пользователя или несоблюдение инструкции по применению и мер предосторожности, компания Мекспо Интернешнл Инк. не несет ответственности, в частности, за ущерб любого рода, связанный прямо или косвенно с изделием и его использованием. Мекспо Интернешнл Инк. и ее дистрибьюторы не несут ответственности за вред, причиненный в связи с повторным использованием изделия, для которого предусмотрено только однократное применение.

23. Уполномоченный представитель производителя в РФ и служба потребителей

Общество с ограниченной ответственностью «БЛОССОМ»

(ООО «БЛОССОМ»)

198188, Россия, г. Санкт-Петербург,

улица Возрождения, дом № 7/25, литера А, кв. 81

Тел./Факс: +7 812 983-59-77, 958-09-39

www.blossomspb.ru

Электронная почта: info@blossomspb.ru

Authorized Signatures

CALIFORNIA ALL PURPOSE ACKNOWLEDGMENT

A notary public or other officer completing this certificate verifies only the identity of the individual who signed the document to which this certificate is attached, and not the truthfulness, accuracy, or validity of that document.

STATE OF CALIFORNIA)

COUNTY OF ALAMEDA)


On DEC 10 2021 before me, Stanley Michael Przepioski, Notary
Public,

personally appeared Tim Thai

who proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the person(s) whose name(s) is/are subscribed to the within instrument and acknowledged to me that he/she/they executed the same in his/her/their authorized capacity(ies), and that by his/her/their signature(s) on the instrument the person(s), or the entity upon behalf of which the person(s) acted, executed the instrument.

I certify under PENALTY OF PERJURY under the laws of the State of California that the foregoing paragraph is true and correct.

WITNESS my hand and official seal.

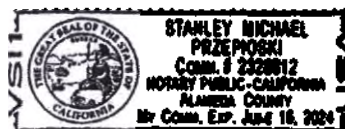

Signature: [Signature] (Seal)

OPTIONAL

Description of Attached Document

Title or Type of Document: _____ Number of Pages: _____

Document Date: _____ Other: _____

Print: TIM THAI Signature: [Signature]

Лист №1:

Штамп: МЕКСПО ИНТЕРНЕШНЛ ИНК.

/Подпись/

Подпись уполномоченного лица

Лист №28:

Штамп: МЕКСПО ИНТЕРНЕШНЛ ИНК.

/Подпись/

Подпись уполномоченного лица

Лист №29:

СТАНДАРТНОЕ НОТАРИАЛЬНОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ КАЛИФОРНИИ

Нотариус или другой служащий, исполняющий данное удостоверение, удостоверяет исключительно личность подписавшего документ, для которого выдано настоящее удостоверение. Удостоверение не распространяется на верность, точность и действительность данных, изложенных в документе.

ШТАТ КАЛИФОРНИЯ }
ОКРУГ АЛАМИДА }

10 ДЕКАБРЯ 2021 года, ко мне, Стэнли Майклу Пржепёски, нотариусу,

лично обратился Тим Тай,

чья личность на основании удовлетворительных данных была установлена как личность лица, подписавшего документ, а также я подтверждаю наличие у него полномочий, необходимых для исполнения данного документа от имени лица или компании, исполняющих такой документ.

ОСОЗНАВАЯ СВОЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАВЕДОМО ЛОЖНЫХ СВЕДЕНИЙ, я удостоверяю, что вышеизложенный текст является верным и точным.

В ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЧЕГО я поставил свою подпись и печать.

Штамп: Стэнли Майкл Пржепёски *

Лицензия № 2328812

Нотариус * Калифорния * Округ Аламида

Срок действия лицензии: 16 июня 2024 г.

<Великая печать штата Калифорния>

Подпись /Подпись/ (Печать)

_____ ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПО ЖЕЛАНИЮ _____

Описание Приложенного Документа

Наименование или тип Документа: _____ Количество страниц: _____

Дата составления Документа: _____ Иное: _____

Имя прописью: Тим Тай Подпись: /Подпись/

Перевод данного текста выполнен мной, переводчиком Докучаевым Дмитрием Игоревичем.

Российская Федерация

Город Москва

Двадцать второго декабря две тысячи двадцать первого года

Я, Квитко Федор Александрович, нотариус города Москвы, свидетельствую подлинность подписи переводчика Докучаева Дмитрия Игоревича.


Подпись сделана в моем присутствии.

Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: № 62/137-н/77-2021-19 -109/

Уплачено за совершение нотариального действия: 400 руб. 00 коп.

Ф.А. Квитко

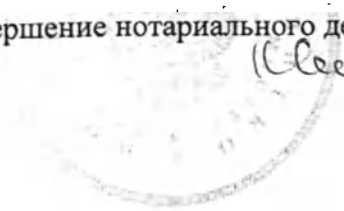

Всего прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью 10 листов

Нотариус



Российская Федерация
Город Москва

Двадцать второго декабря две тысячи двадцать первого года

Я, Квитко Федор Александрович, нотариус города Москвы,
свидетельствую верность копии с представленного мне
документа.

Зарегистрировано в реестре: № 62/137-н/77-2021-19-1092
Уплачено за совершение нотариального действия: 1860 руб.



Всего прошито, пронумеровано, скреплено
печатью 31 лист(а) (ов)

Нотариус Ф.А. Квитко

Ф.А. Квитко