

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «Мега - Форт»

А.В. Фомичев

Инструкция по применению

1. Наименование медицинского изделия.

«Салфетка для дезинфекции неповрежденной кожи и поверхностей по ТУ 9398-001-82551178-2008» (далее по тексту - салфетка) следующих исполнений:

- со средством дезинфицирующим «СЕПТОЦИД Р», типоразмер салфетки по длине или ширине должен быть в диапазоне от 60мм до 170мм;
- с 70% водно-спиртовым раствором изопропилового спирта, типоразмер салфетки по длине или ширине должен быть в диапазоне от 60мм до 170мм.

2. Показания для применения медицинского изделия.

Салфетка, предназначена для обработки кожи (при проведении инъекций, обработки рук медицинского персонала и т.д.), а так же для очистки и дезинфекции поверхностей медицинских изделий (поверхности медицинских столов, приборов, аппаратов, предметов по уходу за больными и т.д.) в лечебно-профилактических учреждениях любого профиля, в аптеках, в машинах скорой медицинской помощи и служб ГО и ЧС, пенитенциарных учреждениях, при комплектации аптек и укладок различного назначения, а также населением в быту (в детских дошкольных и школьных учреждениях, предприятиях коммунально-бытового обслуживания, на предприятиях социального обеспечения).

ПРИМЕНЕНИЕ

2.1 ОБРАБОТКА КОЖИ ИНЪЕКЦИОННОГО ПОЛЯ:

вскрыть пакет, быстро достать салфетку и обработать необходимый участок кожного покрова делая мазки в одном направлении, время выдержки после окончания обработки – до высыхания кожи.

2.2. ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА РУК:

вскрыть пакет, быстро достать салфетку и тщательно протереть кисти рук втирая содержимое салфетки в кожу и между пальцев. Время обработки – до полного высыхания (но не менее 30сек). При необходимости применить еще одну салфетку.

2.3. ОЧИСТКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ РАЗЛИЧНЫХ ПРЕДМЕТОВ И ОБОРУДОВАНИЯ:

вскрыть пакет, быстро достать салфетку и тщательно протереть поверхности различных предметов и оборудования. Одной салфеткой можно обработать до 0,3 м² площади. Дождаться полного высыхания. Следить за полным увлажнением поверхностей.

3. Противопоказания для применения медицинского изделия.

Не обрабатывать салфетками открытые раны и слизистые оболочки.

Не использовать при нарушенной потребительской упаковке.

Не использовать по истечении срока годности.

4. Меры предосторожности при применении медицинского изделия.

Использовать только для наружного применения.

Избегать попадания средства дезинфицирующего (пропитки) в глаза!

Не допускать контакта с открытым пламенем и нагревательными приборами.

Хранить в местах недоступных для детей.

При случайном попадании средства дезинфицирующего (пропитки) в глаза их следует обильно промыть проточной водой. При появлении гиперемии закапать 20% или 30% раствор сульфацила натрия (альбуцида). Обратиться к врачу.

При случайном попадании средства дезинфицирующего (пропитки) в желудок рекомендуется обильное питье, промывание желудка и прием адсорбентов (активированный уголь и др.). Обратиться к врачу.

5. Возможные побочные действия при использовании медицинского изделия.

Индивидуальная непереносимость средства дезинфицирующего (пропитки).

При появлении на коже раздражения, сыпи прекратить применение салфеток. Руки вымыть водой с мылом. При не прохождении вышеуказанных побочных действиях, обратиться к лечащему врачу.

При правильном использовании, хранении и транспортировании побочные действия отсутствуют.

6. Краткие технические характеристики.

Салфетка представляет собой прямоугольный или квадратный отрез нетканого гипоаллергенного полотна белого цвета не оставляющего на поверхности кожи и поверхностей волокнистых компонентов, пропитанного средством дезинфицирующим и упакованного в герметичные пакетики (индивидуальная упаковка).

Салфетка выпускается со следующими пропитками (дезинфицирующими растворами):

- со средством дезинфицирующим «СЕПТОЦИД Р»;
- с 70% водно-спиртовым раствором изопропилового спирта.

Типоразмер салфетки по длине или ширине должен быть в диапазоне от 60мм до 170мм.

Общая масса (салфетка со средством дезинфицирующим (пропитка) и индивидуальной упаковкой) должна быть, г, не более 10.

Салфетка должна быть пропитана не менее 1 мл, но не более 4 мл одним из дезинфицирующих средств.

Индивидуальная упаковка салфетки должна быть герметична. Сварной шов должен быть ровный без пропусков. Ширина сварного шва должна быть (4 ± 1) мм.

Материал из которого изготовлена салфетка не должен попадать в контурный шов индивидуальной упаковки.

Комплектность:

- салфетка в индивидуальной упаковке с нанесенной маркировкой – 1 шт.

Примечание: количество поставляемых салфеток по требованию Заказчика.

7. Порядок осуществления утилизации.

В лечебно-профилактических учреждениях салфетки, использованные или с истекшим сроком годности утилизируются согласно инструкций действующих в учреждении. Во всех других случаях салфетки использованные или с истекшим сроком годности утилизируются как безопасные медицинские отходы класса А или вместе с бытовыми отходами.

8. Гарантии, срок годности, условия хранения и указание на запрет использования медицинского изделия по истечении срока годности.

Изготовитель гарантирует соответствие качества изделия, в течение всего срока годности, требованиям ТУ 9398-001-82551178-2008, конструкторской документации производителя, при соблюдении правил транспортирования, хранения и правильного применения, установленных настоящей инструкцией по применению.

Гарантийный срок годности - 3 года со дня изготовления.

Средний срок годности салфеток не менее 5-х лет.

Хранить салфетки в транспортной упаковке в крытых, сухих, вентилируемых помещениях, при температуре от $+5^{\circ}\text{C}$ до $+25^{\circ}\text{C}$. Отдельно от лекарств, вдали от нагревательных приборов, открытого огня и прямых солнечных лучей. В местах, недоступных для детей.

Не использовать изделие по истечении срока годности.

9. Сведения о производителе медицинских изделий.

ООО «Мега-Форт»

Юридический адрес : 105484, Москва, 16-я Парковая ул., д. 27

Тел: 8 (985) 999-13-02, www.mfmedikal.ru