

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «ВИТА»



Чаус Н.Н.
2023 г.

ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ
по ТУ 32.50.30-001-48837523-2019

Инструкция по применению
ПТИС.324259.001 И

г. Владивосток

ООО «ВИТА» 690105, Приморский край, город Владивосток, Бородинская улица, дом 46/50, офис 206 Тел.: 8 423 279-59-49; e-mail: vita@vita-vdk.ru	Документ: ПТИС.324259.001 И
	Версия: 1.3
	Страница: 2 из 67

СОДЕРЖАНИЕ

1	ОПИСАНИЕ И РАБОТА	4
1.1	Назначение и условия применения	4
1.2	Показания	4
1.3	Противопоказания	4
1.4	Побочные эффекты.....	4
1.5	Меры предосторожности	4
1.6	Принцип действия и конструкция шкафа	5
2	ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ.....	32
2.1	Основные параметры и характеристики.....	32
2.2	Требования к сырью, материалам и покупным изделиям	36
2.3	Требования к надежности	42
2.4	Комплектность	42
2.5	Маркировка	43
2.6	Упаковка.....	44
3	ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ	45
4	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ	46
4.1	Эксплуатационные ограничения	46
4.2	Подготовка к эксплуатации	46
4.3	Порядок работы с изделием	48
5	УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ	49
6	УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	50
7	ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ.....	51
8	ТРЕБОВАНИЯ УТИЛИЗАЦИИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.....	52
9	СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ	53
10	СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ.....	54
11	СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ	55
12	ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.....	56
	ПРИЛОЖЕНИЕ А. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ.....	58
	ПРИЛОЖЕНИЕ Б	60
	Лист регистрации изменений	67

ООО «ВИТА» 690105, Приморский край, город Владивосток, Бородинская улица, дом 46/50, офис 206 Тел.: 8 423 279-59-49; e-mail: vita@vita-vdk.ru	Документ: ПТИС.324259.001 И
	Версия: 1.3
	Страница: 3 из 67

Настоящая инструкция распространяется на Шкаф медицинский (далее – Шкаф) и представляет собой документ, содержащий сведения о назначении, конструкции, принципе действия и характеристиках шкафа, необходимые для правильной эксплуатации, транспортирования, хранения, обслуживания и утилизации, а также сведения, удостоверяющие гарантии изготовителя.

 Информация, важная для безопасного применения шкафа отмечена предупредительным треугольником с восклицательным знаком. Этим указаниям следует уделять особое внимание.

 К эксплуатации допускается медицинский персонал и пациенты, детально изучившие настоящую инструкцию по применению.

 **ВНИМАНИЕ! Модификация изделия не допускается!**

 Ремонт изделия может осуществляться только квалифицированным специально обученным персоналом сервисных центров.

По всем вопросам, касающимся использования шкафа, необходимо обращаться к изготовителю:

ООО «ВИТА», 690105, Приморский край, город Владивосток, Бородинская улица, дом 46/50, офис 206

Тел.: 8 423 279-59-49

E-mail: vita@vita-vdk.ru

Настоящая инструкция разработана в соответствии с требованиями ГОСТ 2.106, ГОСТ 2.601, ГОСТ 2.610.

ООО «ВИТА» 690105, Приморский край, город Владивосток, Бородинская улица, дом 46/50, офис 206 Тел.: 8 423 279-59-49; e-mail: vita@vita-vdk.ru	Документ: ПТИС.324259.001 И
	Версия: 1.3
	Страница: 4 из 67

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1 Назначение и условия применения

Шкаф предназначен для использования в специальных медицинских помещениях (манипуляционные, процедурные и перевязочные кабинеты, стерилизационные, палаты интенсивной терапии, лабораторные клиничко-диагностические и бактериологические помещения) для хранения перевязочного материала, медицинской посуды, медицинских инструментов.

Сфера применения: в условиях лечебно-профилактических учреждений.

В зависимости от потенциального риска применения шкаф относится к классу 1 (согласно приказу министерства здравоохранения Российской Федерации №4н от 06.06.2012).

В зависимости от устойчивости к климатическим воздействиям шкаф относится к виду УХЛ4.2 по ГОСТ 15150.

В зависимости от воспринимаемых механических воздействий при эксплуатации шкаф относится к группе 1 по ГОСТ Р 50444.

В зависимости от возможных последствий отказа в процессе эксплуатации шкаф относится к классу Г по ГОСТ Р 50444.

В приложении Б указаны сведения в части специальных медицинских помещений, назначения и размещаемых медицинских изделий для каждого варианта исполнения.

1.2 Показания

Организация хранения предметов медицинского работника/пациента, а именно:

- хранение перевязочных материалов;
- хранение инструментов, в том числе хирургических;
- использование в условиях медицинских лабораторий.

1.3 Противопоказания

Возможна индивидуальная непереносимость материала.

1.4 Побочные эффекты

Побочные эффекты не наблюдаются при соблюдении требований настоящей инструкции по применению, показаний и противопоказаний.

1.5 Меры предосторожности

Внимание!

- Используйте шкаф только в соответствии с данной инструкцией.
- Уход за шкафом осуществлять в соответствии с данной инструкцией.
- Не допускается применять соду, порошки, пасты и другие абразивные материалы, не предназначенные для ухода за шкафом.
- Не следует ставить на поверхность шкафа горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.
- Не допускается ударов жесткими предметами.

ООО «ВИТА» 690105, Приморский край, город Владивосток, Бородинская улица, дом 46/50, офис 206 Тел.: 8 423 279-59-49; e-mail: vita@vita-vdk.ru	Документ: ПТИС.324259.001 И
	Версия: 1.3
	Страница: 5 из 67

1.6 Принцип действия и конструкция шкафа

Шкаф представляет собой предмет мебели с дверями, полками, , с выдвижными ящиками и без них, который используется для хранения перевозочного материала, медицинской посуды, медицинских инструментов.

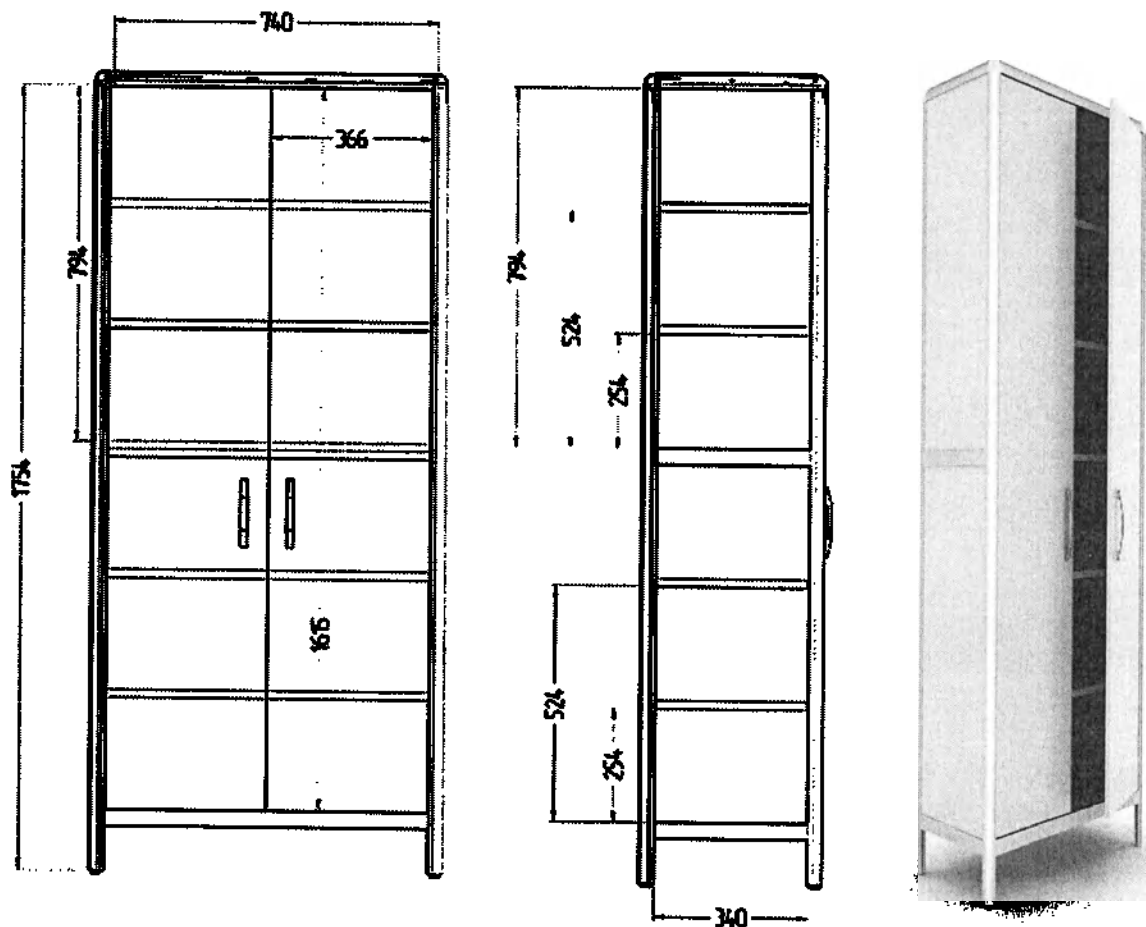


Рисунок 1 - Шкаф медицинский двухстворчатый (Арт. Ш-001)

Таблица 1 - Размеры шкафа медицинского двухстворчатого (Арт. Ш-001)

Размеры, мм	Ширина шкафа	Глубина шкафа	Максимальная высота шкафа	Минимальная высота шкафа	Полки 5 шт.	
					Ширина	Глубина
	800	400	1830	1800	760	350

Толщина задней стенки: 16 мм.

ООО «ВИТА» 690105, Приморский край, город Владивосток, Бородинская улица, дом 46/50, офис 206 Тел.: 8 423 279-59-49; e-mail: vita@vita-vdk.ru	Документ: ПТИС.324259.001 И
	Версия: 1.3
	Страница: 6 из 67

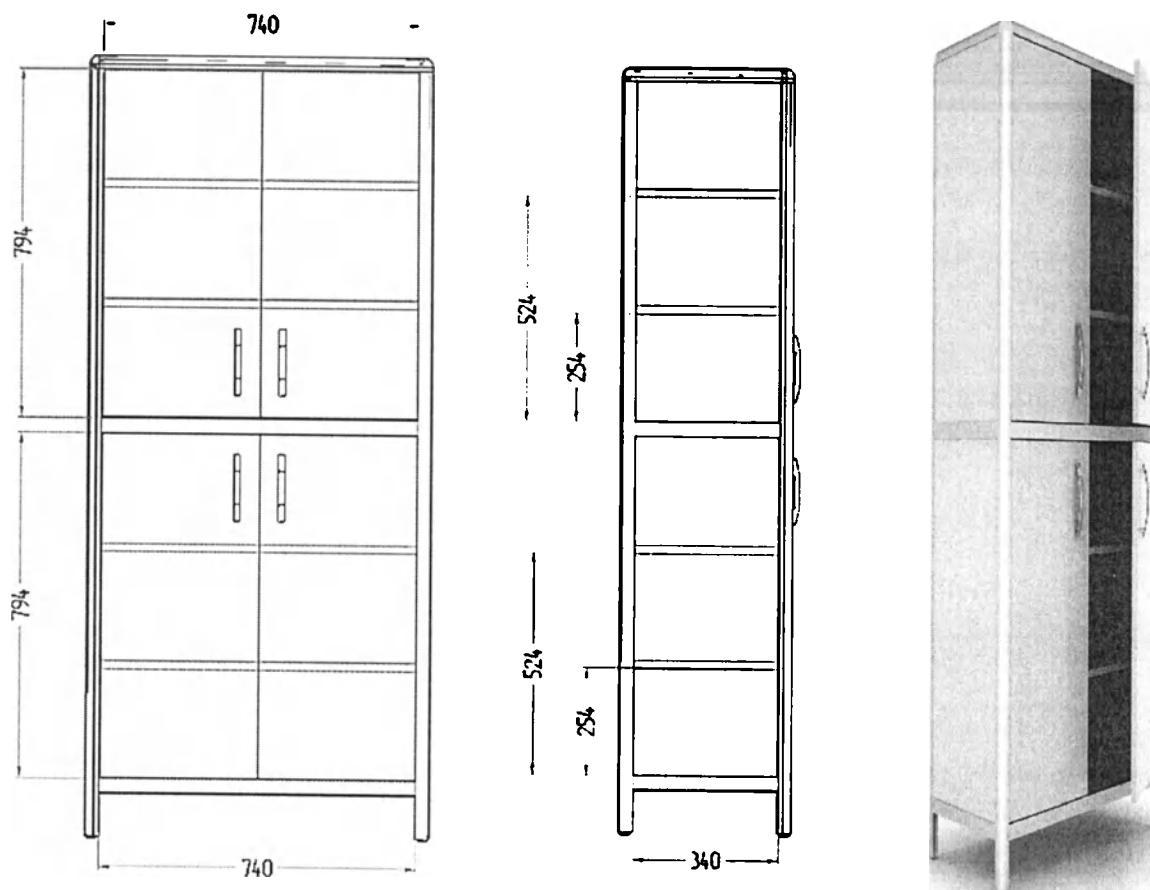


Рисунок 2 - Шкаф медицинский с четырьмя дверями
двухсекционный (Арт. Ш-002)

Таблица 2 - Размеры шкафа медицинского с четырьмя дверями двухсекционного (Арт. Ш-002)

	Ширина шкафа	Глубина шкафа	Максимальная высота шкафа	Минимальная высота шкафа	Полки 4 шт.	
					Ширина	Глубина
Размеры, мм	800	400	1830	1800	760	350

Толщина задней стенки: 16 мм.

ООО «ВИТА» 690105, Приморский край, город Владивосток, Бородинская улица, дом 46/50, офис 206 Тел.: 8 423 279-59-49; e-mail: vita@vita-vdk.ru	Документ: ПТИС.324259.001 И	
	Версия:	1.3
	Страница:	7 из 67

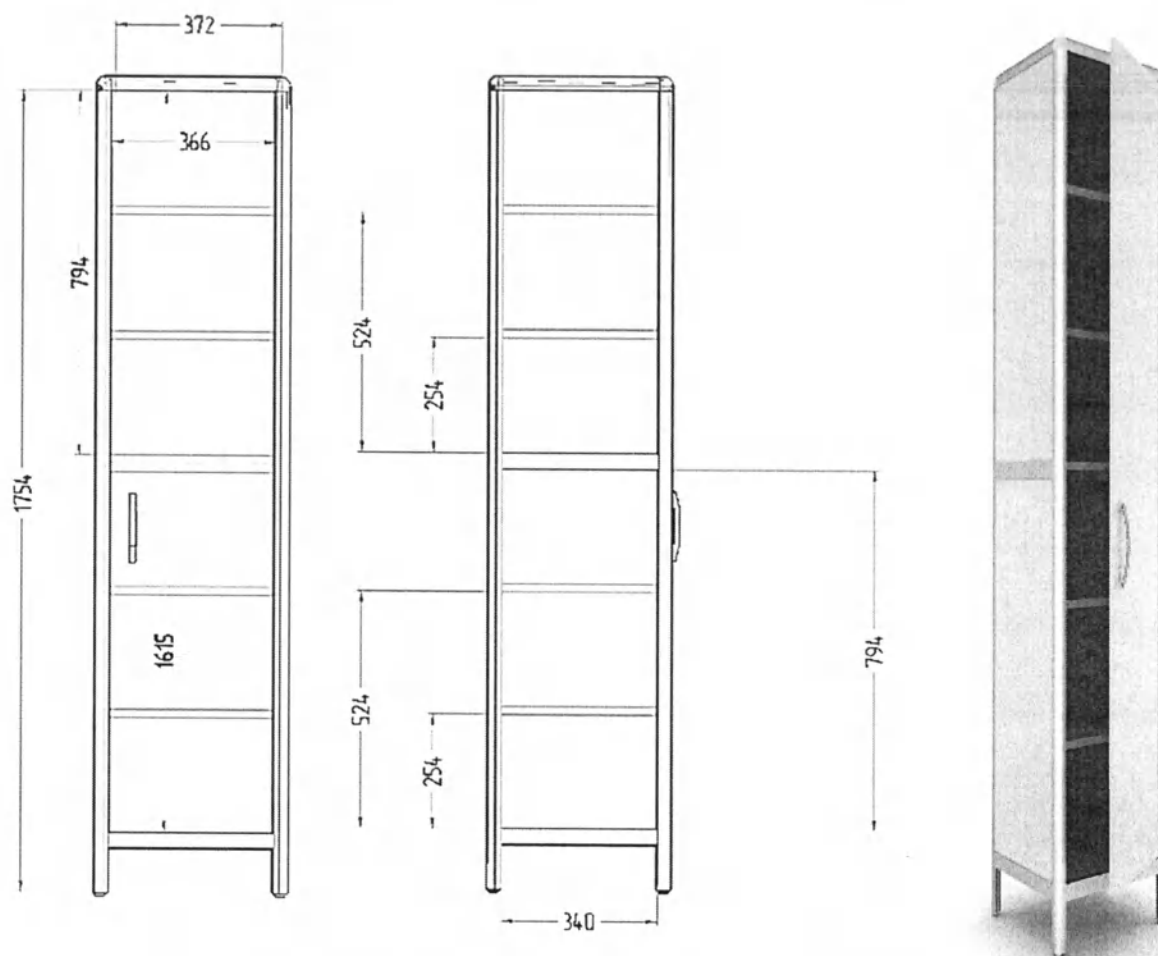


Рисунок 3 - Шкаф медицинский одностворчатый (Арт. Ш-003)

Таблица 3 - Размеры шкафа медицинского одностворчатого (Арт. Ш-003)

	Ширина шкафа	Глубина шкафа	Максимальная высота шкафа	Минимальная высота шкафа	Полки 5 шт.	
					Ширина	Глубина
Размеры, мм	432	400	1830	1800	392	350

Толщина задней стенки: 16 мм.

ООО «ВИТА» 690105, Приморский край, город Владивосток, Бородинская улица, дом 46/50, офис 206 Тел.: 8 423 279-59-49; e-mail: vita@vita-vdk.ru	Документ: ПТИС.324259.001 И
	Версия: 1.3
	Страница: 8 из 67

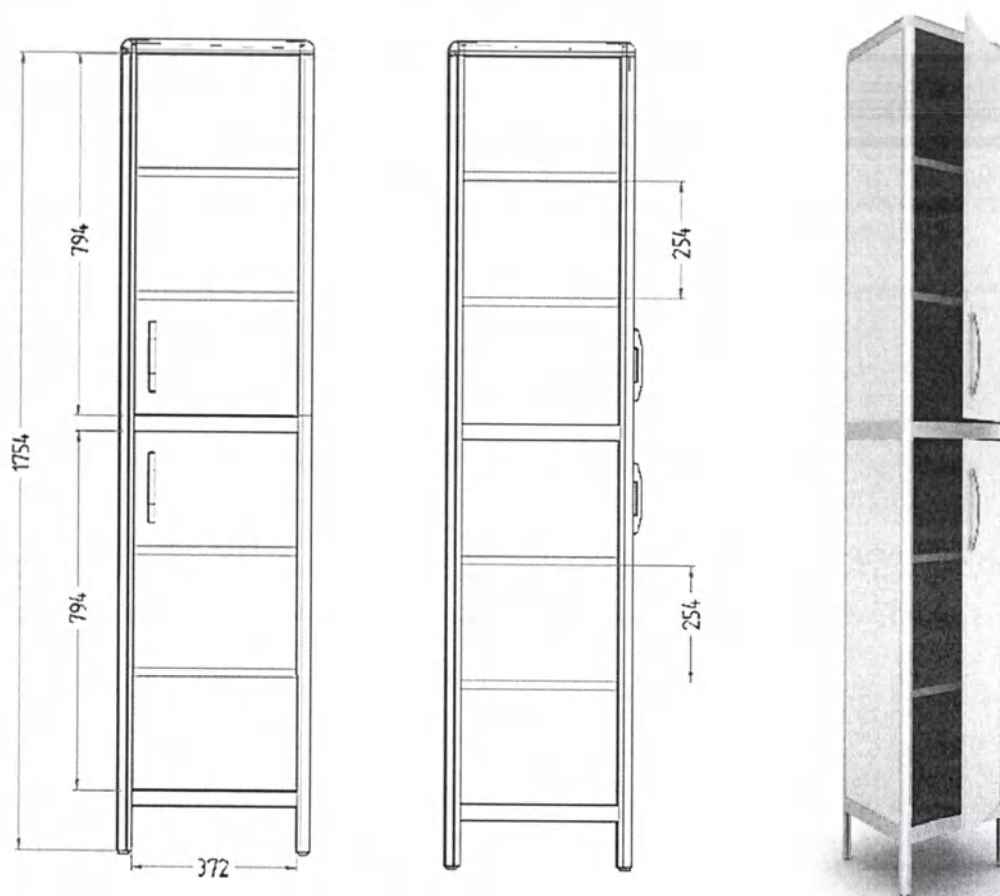


Рисунок 4 - Шкаф медицинский с двумя дверями двухсекционный (Арт. Ш-004)

Таблица 4 - Размеры шкафа медицинского с двумя дверями двухсекционного (Арт. Ш-004)

	Ширина шкафа	Глубина шкафа	Максимальная высота шкафа	Минимальная высота шкафа	Полки 4 шт.	
					Ширина	Глубина
Размеры, мм	432	400	1830	1800	392	350

Толщина задней стенки: 16 мм.

ООО «ВИТА» 690105, Приморский край, город Владивосток, Бородинская улица, дом 46/50, офис 206 Тел.: 8 423 279-59-49; e-mail: vita@vita-vdk.ru	Документ: ПТИС.324259.001 И
	Версия: 1.3
	Страница: 9 из 67

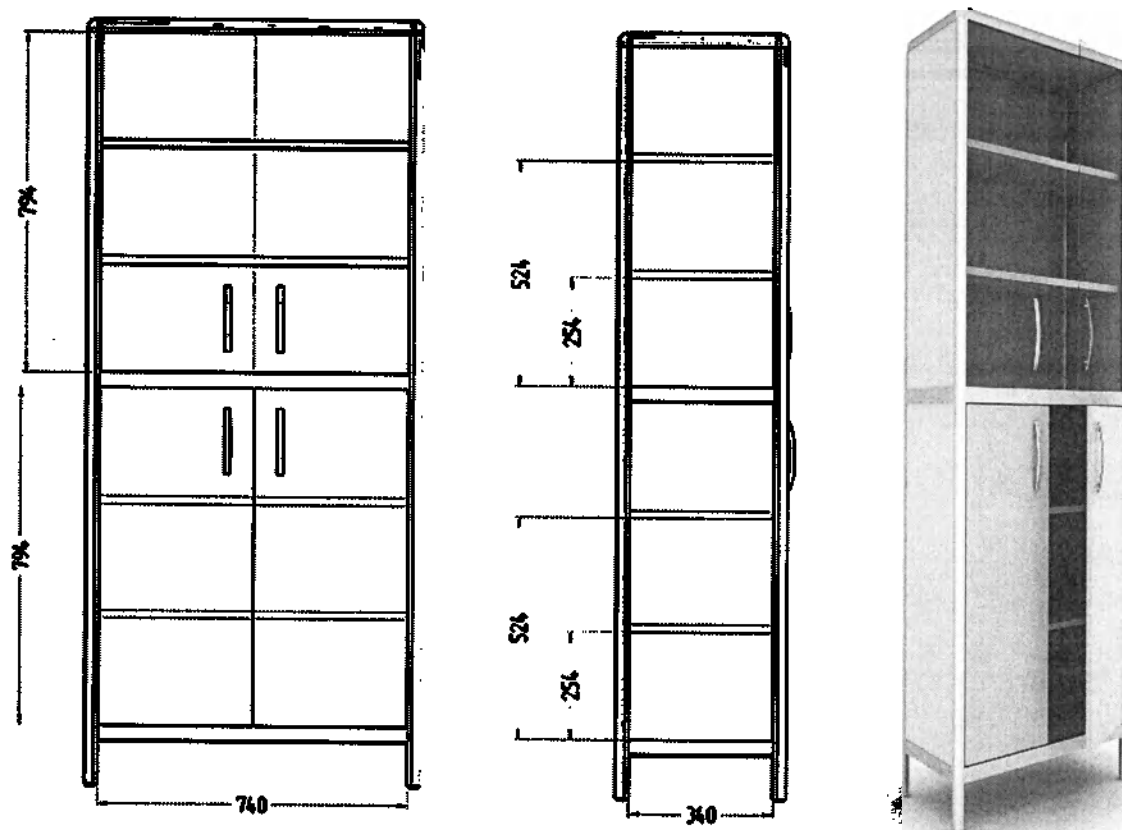


Рисунок 5 - Шкаф медицинский комбинированный двухсекционный с четырьмя дверями (Арт. Ш-005)

Таблица 5 - Размеры шкафа медицинского комбинированного двухсекционного с четырьмя дверями (Арт. Ш-005)

	Ширина шкафа	Глубина шкафа	Максимальная высота шкафа	Минимальная высота шкафа	Полки 4 шт.	
					Ширина	Глубина
Размеры, мм	800	400	1830	1800	760	350

Толщина задней стенки: 16 мм.

ООО «ВИТА» 690105, Приморский край, город Владивосток, Бородинская улица, дом 46/50, офис 206 Тел.: 8 423 279-59-49; e-mail: vita@vita-vdk.ru	Документ: ПТИС.324259.001 И
	Версия: 1.3
	Страница: 10 из 67

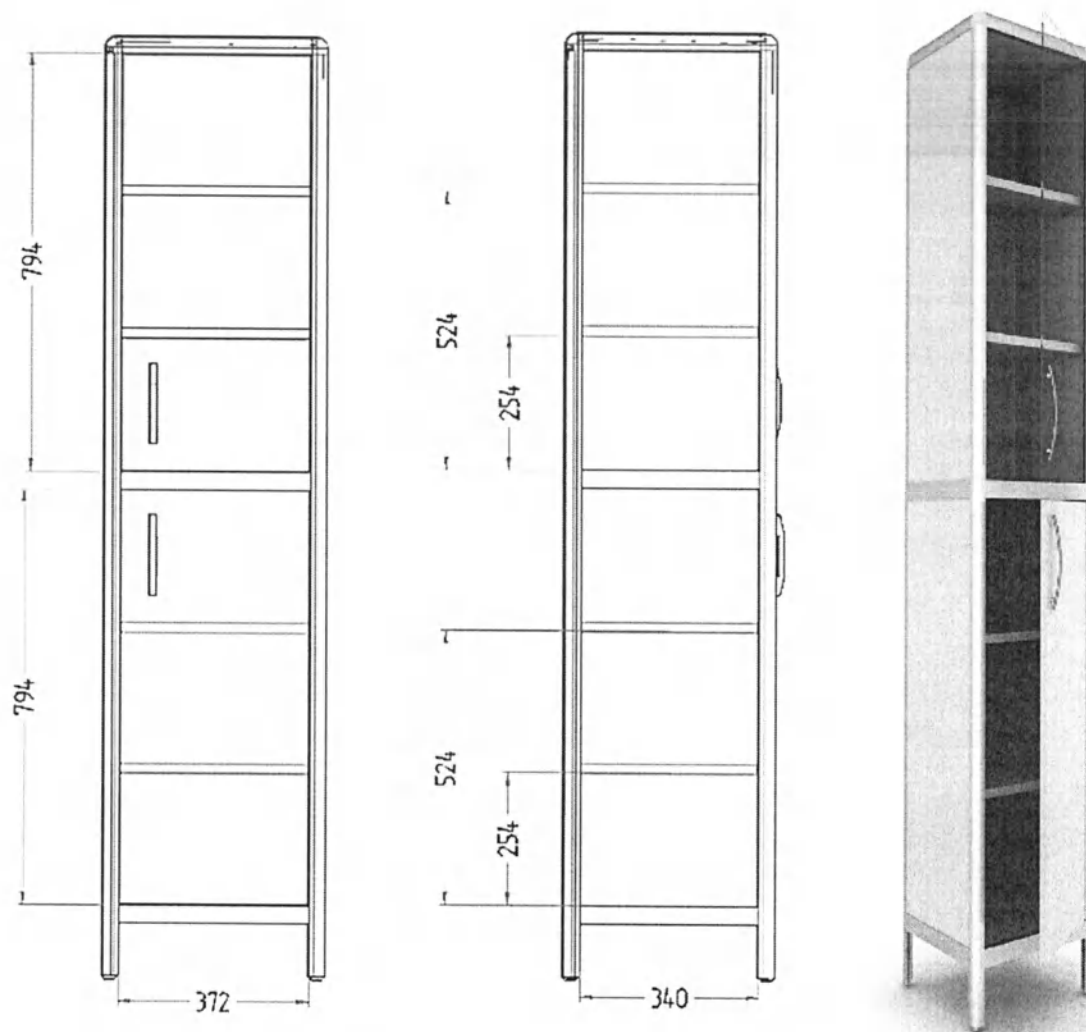


Рисунок 6 - Шкаф медицинский комбинированный двухсекционный с двумя дверями (Арт. Ш-006)

Таблица 6 – Размеры шкафа медицинского комбинированного двухсекционного с двумя дверями (Арт. Ш-006)

Размеры, мм	Ширина шкафа	Глубина шкафа	Максимальная высота шкафа	Минимальная высота шкафа	Полки 4 шт.	
					Ширина	Глубина
	432	400	1830	1800	392	350

Толщина задней стенки: 16 мм.

ООО «ВИТА» 690105, Приморский край, город Владивосток, Бородинская улица, дом 46/50, офис 206 Тел.: 8 423 279-59-49; e-mail: vita@vita-vdk.ru	Документ: ПТИС.324259.001 И
	Версия: 1.3
	Страница: 11 из 67

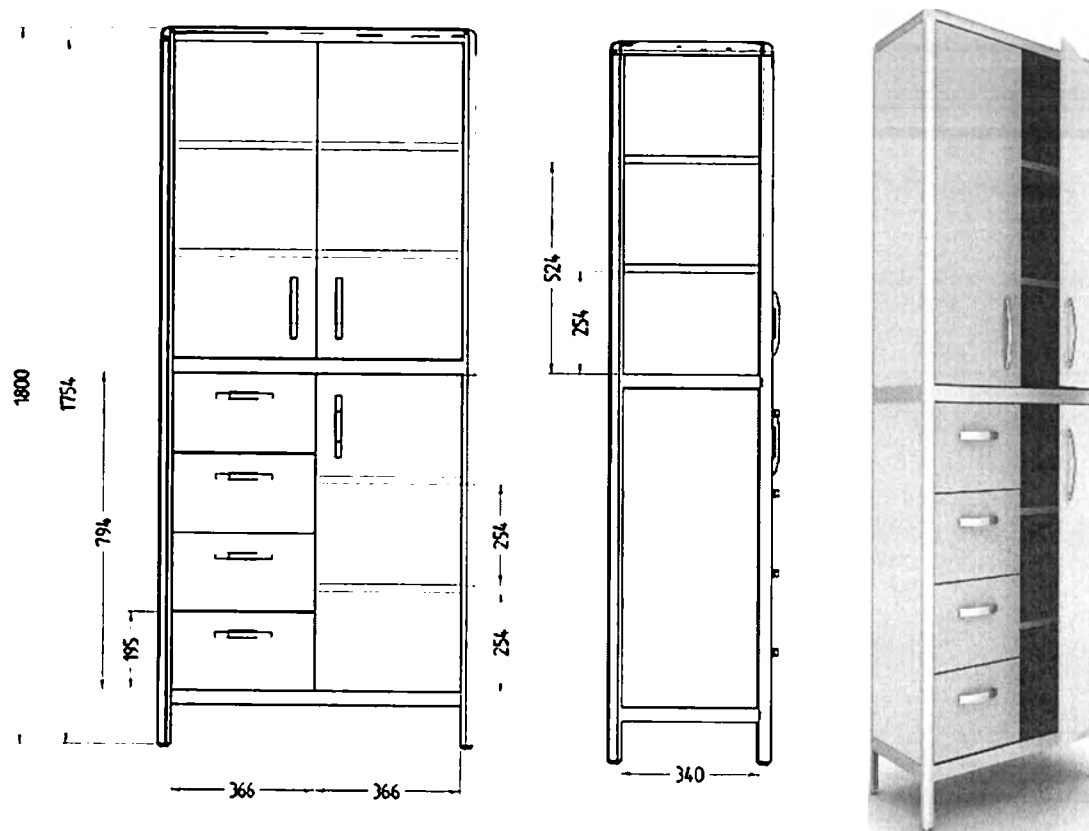


Рисунок 7 - Шкаф медицинский с четырьмя выдвижными ящиками двухсекционный (Арт. Ш-007)

Таблица 7 – Размеры шкафа медицинского с четырьмя выдвижными ящиками двухсекционного (Арт. Ш-007)

Размеры, мм	Ширина шкафа	Глубина шкафа	Максималь ная высота шкафа	Минималь ная высота шкафа	Полки верхние 2 шт.		Полки нижние 2 шт.		Ящики 4 шт.
					Ширина	Глубина	Ширина	Глубина	Глубина
	800	400	1830	1800	760	350	372	350	350

Толщина задней стенки: 16 мм.

ООО «ВИТА» 690105, Приморский край, город Владивосток, Бородинская улица, дом 46/50, офис 206 Тел.: 8 423 279-59-49; e-mail: vita@vita-vdk.ru	Документ: ПТИС.324259.001 И
	Версия: 1.3
	Страница: 12 из 67

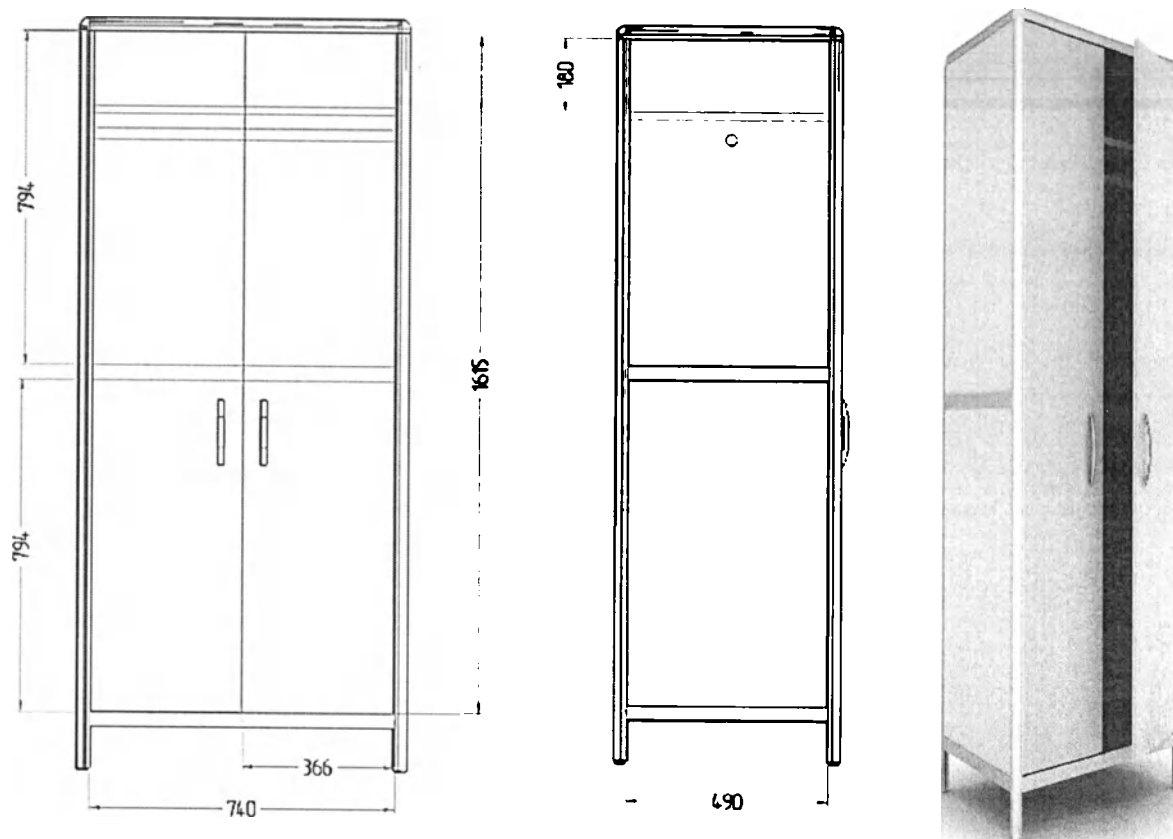


Рисунок 8 - Шкаф медицинский для одежды (Арт. Ш-008)

Таблица 8 – Размеры шкафа медицинского для одежды (Арт. Ш-008)

	Ширина шкафа	Глубина шкафа	Максимальная высота шкафа	Минимальная высота шкафа	Полка 1 шт.		Штанга для вешалок 1 шт.	
					Ширина	Глубина	Длина	Диаметр
Размеры, мм	800	550	1830	1800	760	500	758	25

Толщина задней стенки: 16 мм.

ООО «ВИТА» 690105, Приморский край, город Владивосток, Бородинская улица, дом 46/50, офис 206 Тел.: 8 423 279-59-49; e-mail: vita@vita-vdk.ru	Документ: ПТИС.324259.001 И		
	Версия: 1.3		
	Страница: 13 из 67		

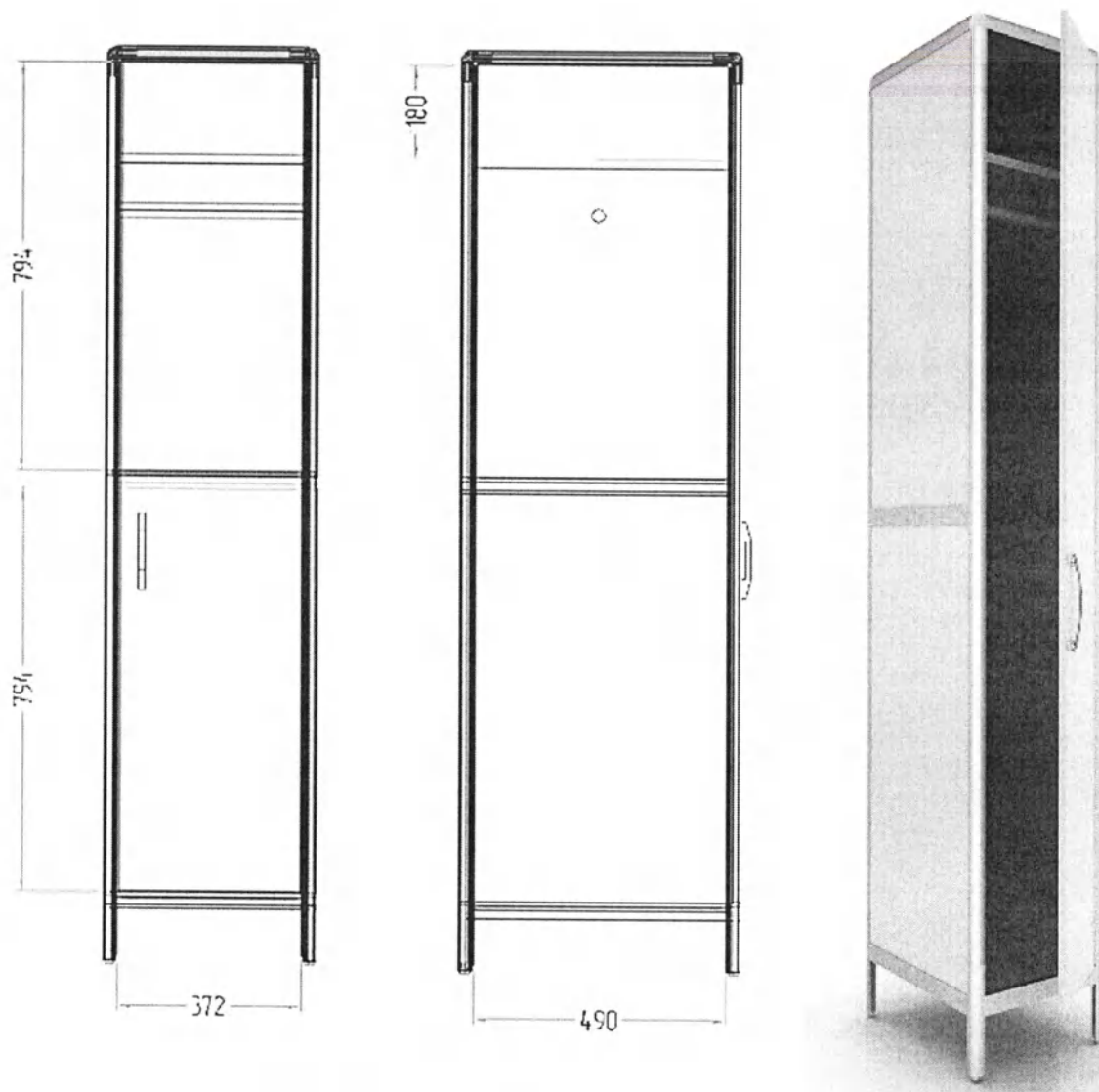


Рисунок 9 - Шкаф медицинский для одежды малый (Арт. Ш-009)

Таблица 9 – Размеры шкафа медицинского для одежды малого (Арт. Ш-009)

	Ширина шкафа	Глубина шкафа	Максимальная высота шкафа	Минимальная высота шкафа	Полка 1 шт.		Штанга для вешалок 1 шт.	
					Ширина	Глубина	Длина	Диаметр
Размеры, мм	432	550	1830	1800	392	500	390	25

Толщина задней стенки: 16 мм.

ООО «ВИТА» 690105, Приморский край, город Владивосток, Бородинская улица, дом 46/50, офис 206 Тел.: 8 423 279-59-49; e-mail: vita@vita-vdk.ru	Документ: ПТИС.324259.001 И
	Версия: 1.3
	Страница: 14 из 67

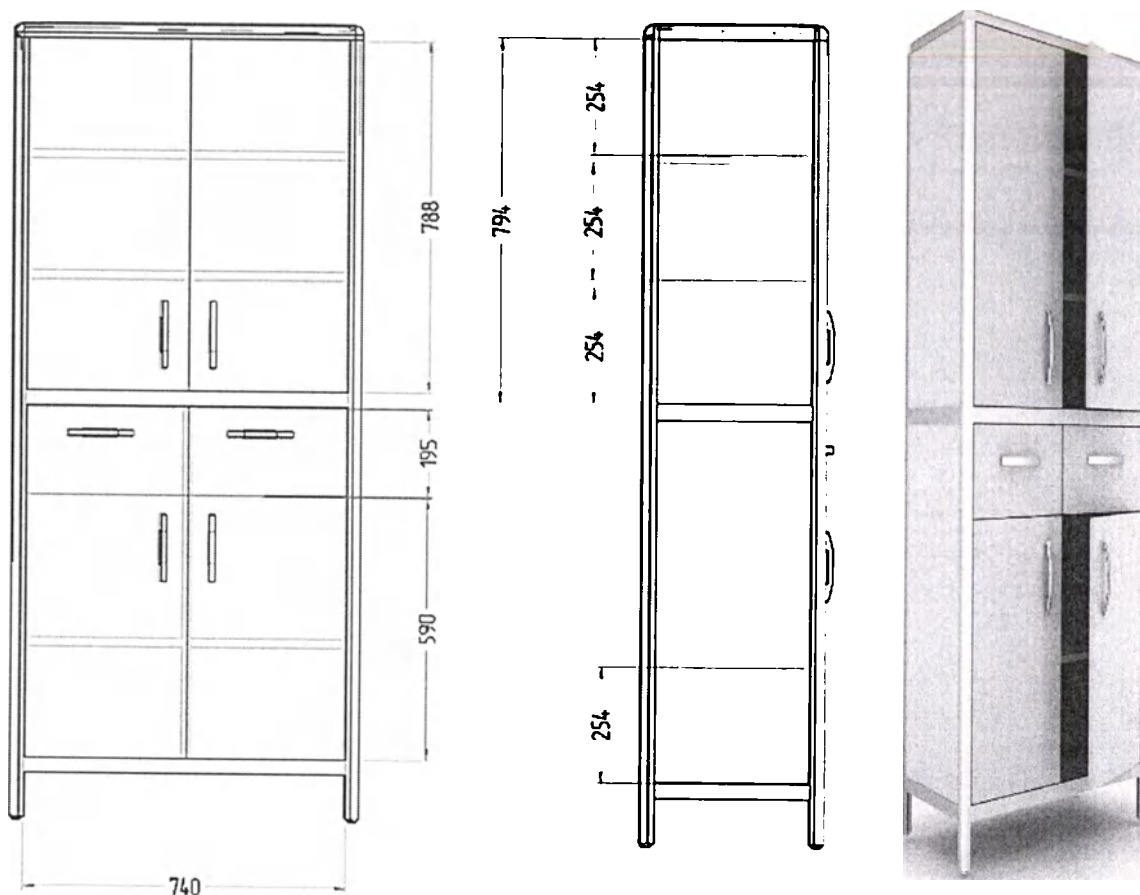


Рисунок 10 - Шкаф медицинский с двумя выдвижными ящиками двухсекционный (Арт. Ш-010)

Таблица 10 – Размеры шкафа медицинского с двумя выдвижными ящиками двухсекционного (Арт. Ш-010)

	Ширина шкафа	Глубина шкафа	Максимальная высота шкафа	Минимальная высота шкафа	Полки 3 шт.		Ящики 2 шт.	
					Ширина	Глубина	Ширина	Глубина
Размеры, мм	800	400	1830	1800	760	350	367	350

Толщина задней стенки: 16 мм.

ООО «ВИТА» 690105, Приморский край, город Владивосток, Бородинская улица, дом 46/50, офис 206 Тел.: 8 423 279-59-49; e-mail: vita@vita-vdk.ru	Документ: ПТИС.324259.001 И
	Версия: 1.3
	Страница: 15 из 67

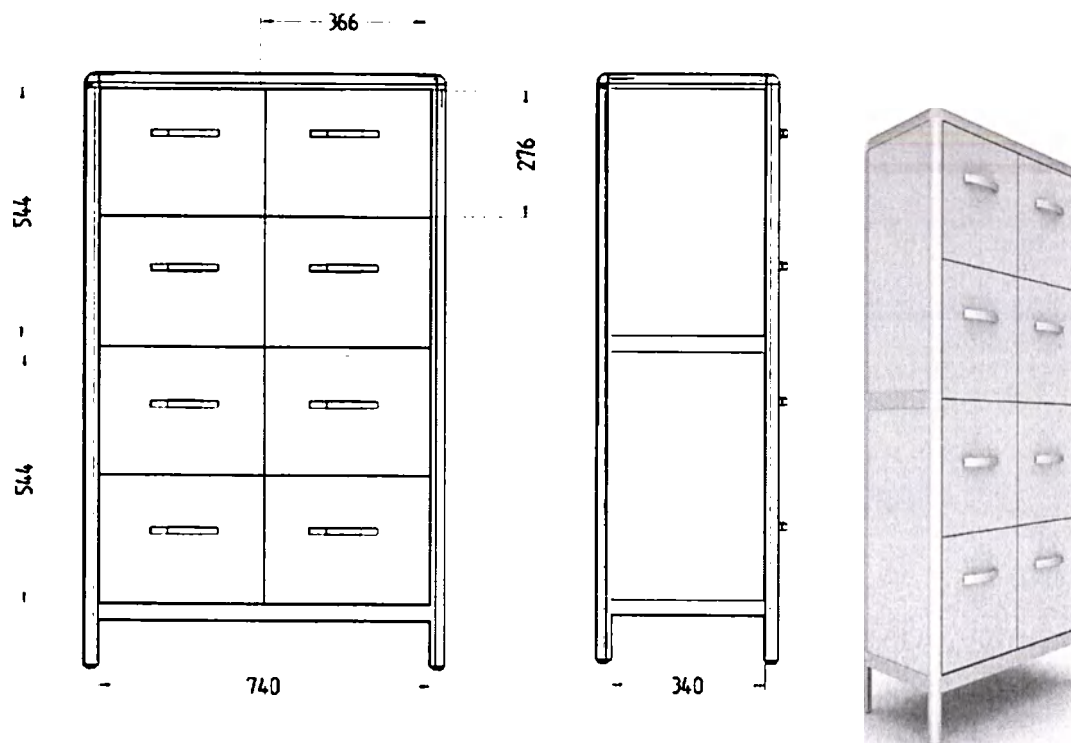


Рисунок 11 - Шкаф медицинский с восьмью выдвижными ящиками (Арт. Ш-011)

Таблица 11 – Размеры шкафа медицинского с восьмью выдвижными ящиками (Арт. Ш-011)

	Ширина шкафа	Глубина шкафа	Максимальная высота шкафа	Минимальная высота шкафа	Ящики 8 шт.	
					Ширина	Глубина
Размеры, мм	800	400	1330	1300	367	350

Толщина задней стенки: 16 мм.

ООО «ВИТА» 690105, Приморский край, город Владивосток, Бородинская улица, дом 46/50, офис 206 Тел.: 8 423 279-59-49; e-mail: vita@vita-vdk.ru	Документ: ПТИС.324259.001 И
	Версия: 1.3
	Страница: 16 из 67

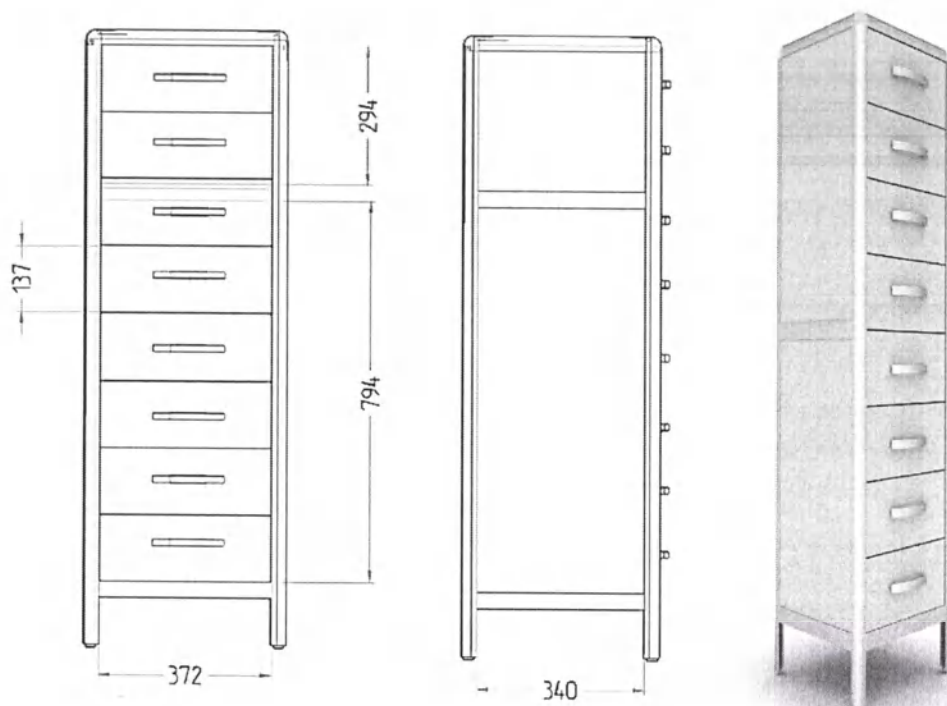


Рисунок 12 - Шкаф медицинский с восьмью выдвижными ящиками
односекционный (Арт. Ш-012)

Таблица 12 – Размеры шкафа медицинского с восьмью выдвижными ящиками
односекционного (Арт. Ш-012)

Размеры, мм	Ширина шкафа	Глубина шкафа	Максимальная высота шкафа	Минимальная высота шкафа	Ящики 8 шт.	
					Ширина	Глубина
Размеры, мм	432	400	1330	1300	367	350

Толщина задней стенки: 16 мм.

ООО «ВИТА» 690105, Приморский край, город Владивосток, Бородинская улица, дом 46/50, офис 206 Тел.: 8 423 279-59-49; e-mail: vita@vita-vdk.ru	Документ: ПТИС.324259.001 И
	Версия: 1.3
	Страница: 17 из 67

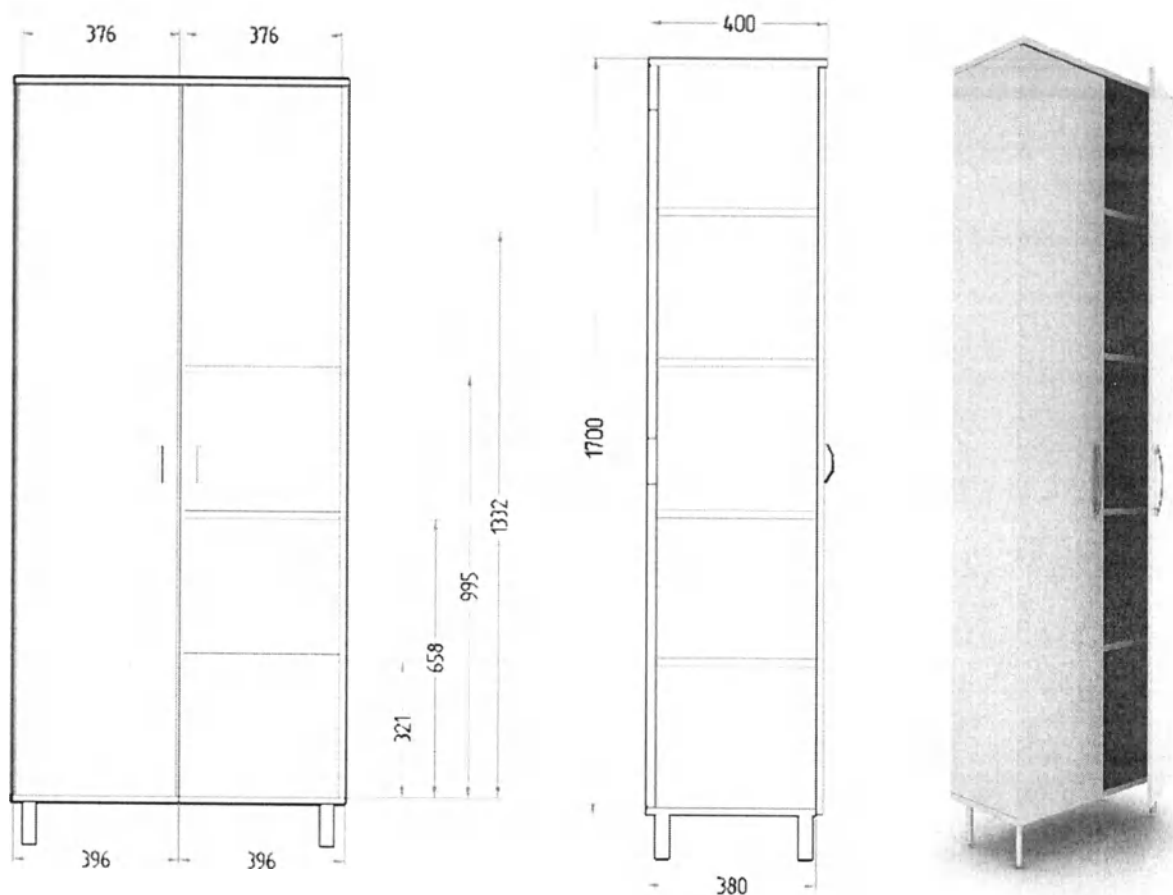


Рисунок 13 - Шкаф медицинский двухстворчатый с перегородкой (Арт. Ш-013)

Таблица 13 – Размеры шкафа медицинского двухстворчатого с перегородкой (Арт. Ш-013)

Размеры, мм	Ширина шкафа	Глубина шкафа	Максимальная высота шкафа	Минимальная высота шкафа	Полки 4 шт.	
					Ширина	Глубина
	800	400	1815	1800	375	350

Толщина задней стенки: 3,2 мм.

ООО «ВИТА» 690105, Приморский край, город Владивосток, Бородинская улица, дом 46/50, офис 206 Тел.: 8 423 279-59-49; e-mail: vita@vita-vdk.ru	Документ: ПТИС.324259.001 И
	Версия: 1.3
	Страница: 18 из 67

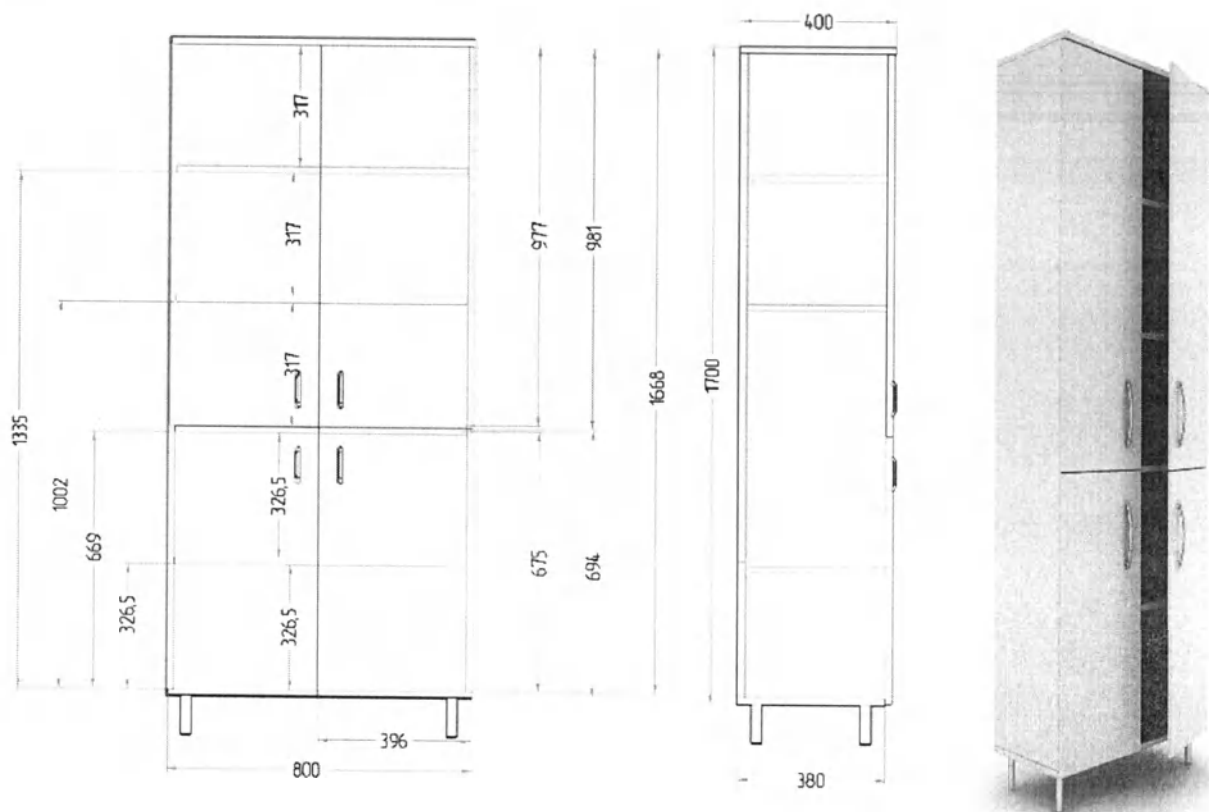


Рисунок 14 - Шкаф медицинский с четырьмя дверями (Арт. Ш-014)

Таблица 14 – Размеры шкафа медицинского с четырьмя дверями (Арт. Ш-014)

Размеры, мм	Ширина шкафа	Глубина шкафа	Максимальная высота шкафа	Минимальная высота шкафа	Полки 3 шт.	
					Ширина	Глубина
	800	400	1815	1800	767	350

Толщина задней стенки: 3,2 мм.

ООО «ВИТА» 690105, Приморский край, город Владивосток, Бородинская улица, дом 46/50, офис 206 Тел.: 8 423 279-59-49; e-mail: vita@vita-vdk.ru	Документ: ПТИС.324259.001 И
	Версия: 1.3
	Страница: 19 из 67

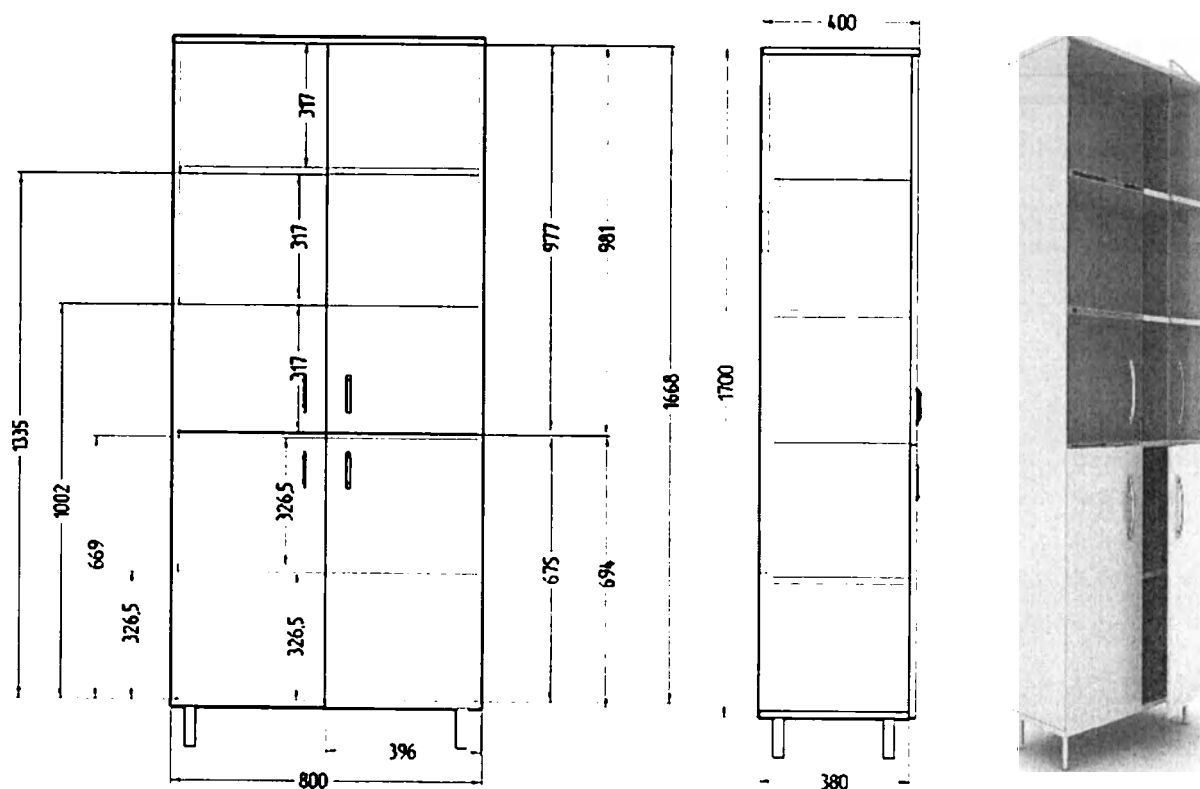


Рисунок 15 - Шкаф медицинский комбинированный
с четырьмя дверями (Арт. Ш-015)

Таблица 15 – Размеры шкафа медицинского комбинированного с четырьмя дверями
(Арт. Ш-015)

Размеры, мм	Ширина шкафа	Глубина шкафа	Максимальная высота шкафа	Минимальная высота шкафа	Полки 3 шт.	
					Ширина	Глубина
Размеры, мм	800	400	1815	1800	767	350

Толщина задней стенки: 3,2 мм.

ООО «ВИТА» 690105, Приморский край, город Владивосток, Бородинская улица, дом 46/50, офис 206 Тел.: 8 423 279-59-49; e-mail: vita@vita-vdk.ru	Документ: ПТИС.324259.001 И
	Версия: 1.3
	Страница: 20 из 67

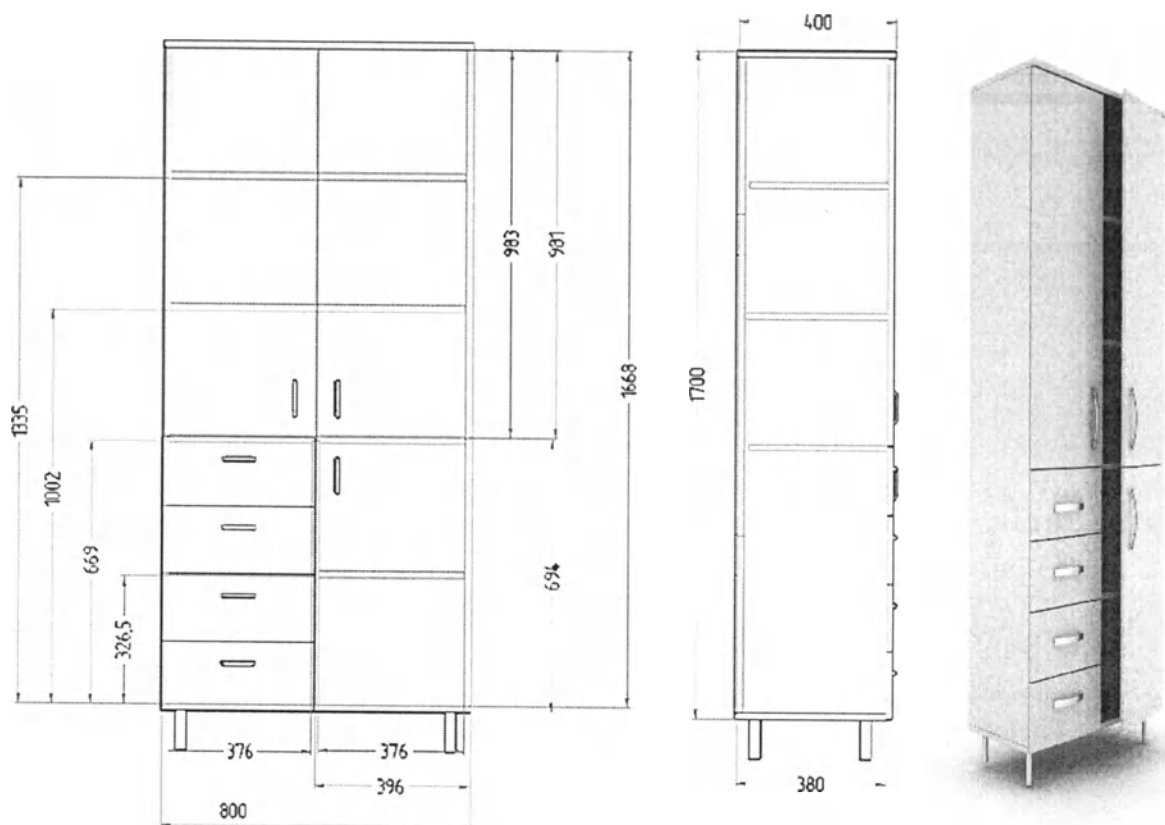


Рисунок 16 - Шкаф медицинский с четырьмя выдвижными ящиками (Арт. Ш-016)

Таблица 16 – Размеры шкафа медицинского с четырьмя выдвижными ящиками (Арт. Ш-016)

Размеры, мм	Ширина шкафа	Глубина шкафа	Максимальная высота шкафа	Минимальная высота шкафа	Полки верхние 2 шт.		Полка нижняя 1 шт.		Ящики 4 шт.		
					Ширина	Глубина	Ширина	Глубина	Ширина	Глубина	Высота
Размеры, мм	800	400	1815	1800	767	350	375	350	396	350	172

Толщина задней стенки: 3,2 мм.

ООО «ВИТА» 690105, Приморский край, город Владивосток, Бородинская улица, дом 46/50, офис 206 Тел.: 8 423 279-59-49; e-mail: vita@vita-vdk.ru	Документ: ПТИС.324259.001 И
	Версия: 1.3
	Страница: 21 из 67

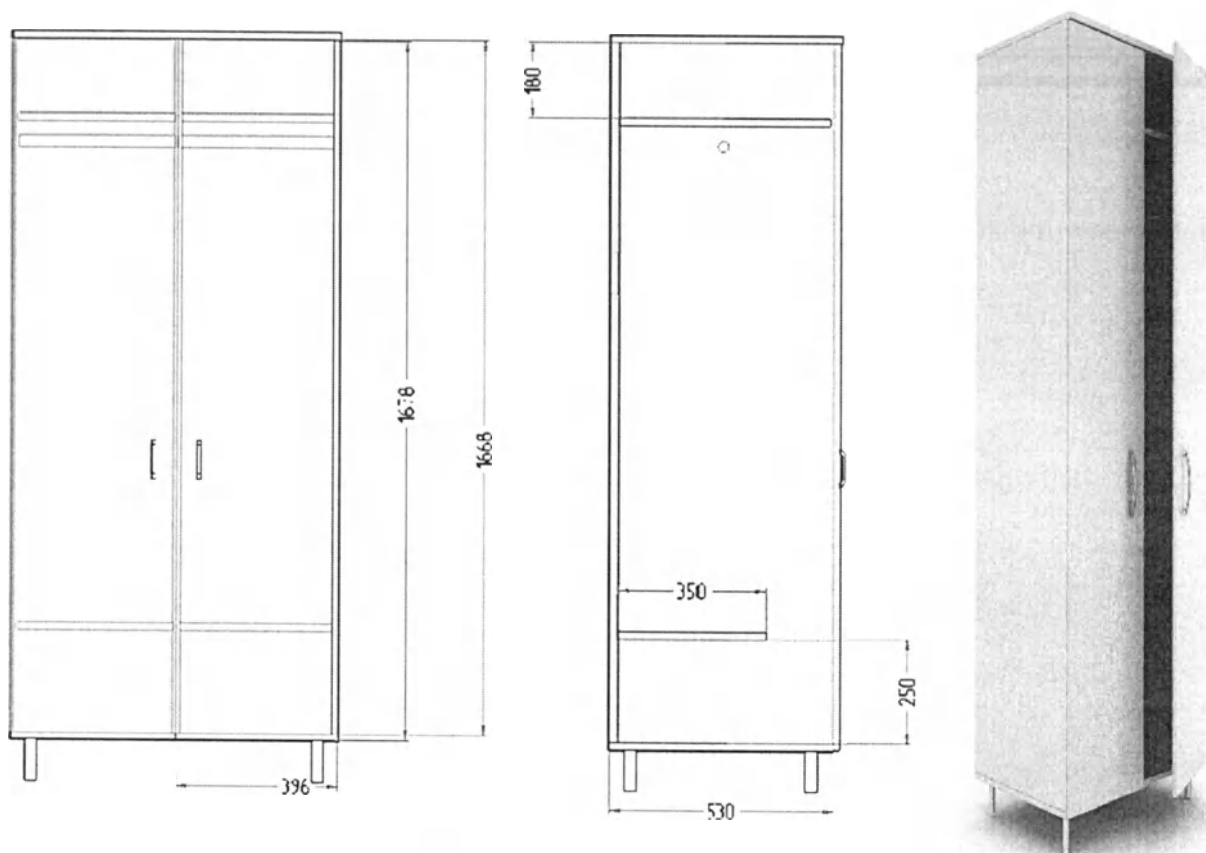


Рисунок 17 - Шкаф медицинский для одежды двухстворчатый (Арт. Ш-017)

Таблица 17 – Размеры шкафа медицинского для одежды двухстворчатого (Арт. Ш-017)

	Ширина шкафа	Глубина шкафа	Максимальная высота шкафа	Минимальная высота шкафа	Полка верхняя 2 шт.		Полка нижняя 2 шт.		Штанга для вешалок 2 шт.	
					Ширина	Глубина	Ширина	Глубина	Длина	Диаметр
Размеры, мм	800	550	1815	1800	376	500	376	350	371	25

Толщина задней стенки: 3,2 мм.

ООО «ВИТА» 690105, Приморский край, город Владивосток, Бородинская улица, дом 46/50, офис 206 Тел.: 8 423 279-59-49; e-mail: vita@vita-vdk.ru	Документ: ПТИС.324259.001 И
	Версия: 1.3
	Страница: 22 из 67

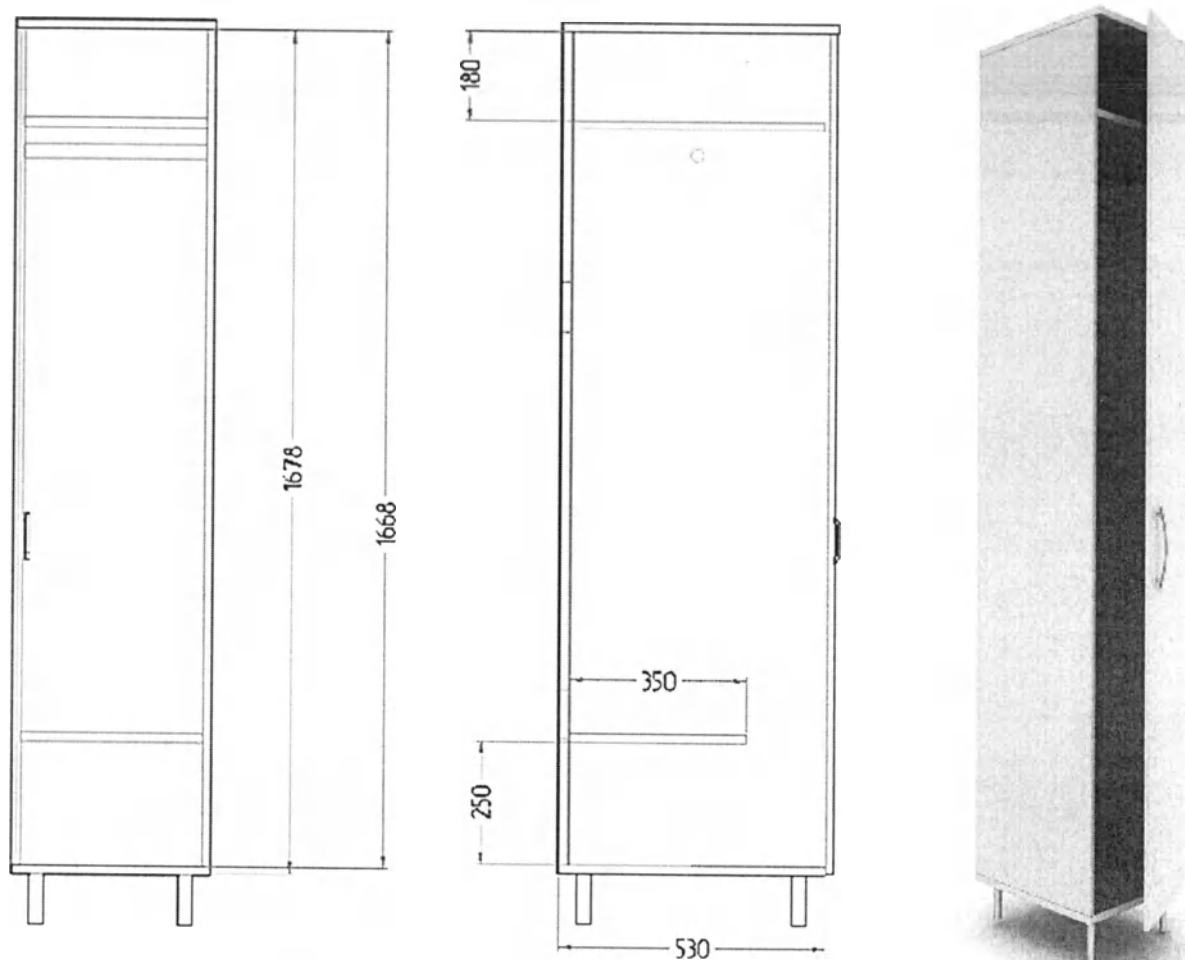


Рисунок 18 - Шкаф медицинский для одежды одностворчатый (Арт. Ш-018)

Таблица 18 - Размеры шкафа медицинского для одежды одностворчатого (Арт. Ш-018)

	Ширина шкафа	Глубина шкафа	Максимальная высота шкафа	Минимальная высота шкафа	Полка верхняя 1 шт.		Полка нижняя 1 шт.		Штанга для вешалок 1 шт.	
					Ширина	Глубина	Ширина	Глубина	Длина	Диаметр
Размеры, мм	400	550	1815	1800	367	500	367	350	363	25

Толщина задней стенки: 3,2 мм.

ООО «ВИТА» 690105, Приморский край, город Владивосток, Бородинская улица, дом 46/50, офис 206 Тел.: 8 423 279-59-49; e-mail: vita@vita-vdk.ru	Документ: ПТИС.324259.001 И
	Версия: 1.3
	Страница: 23 из 67

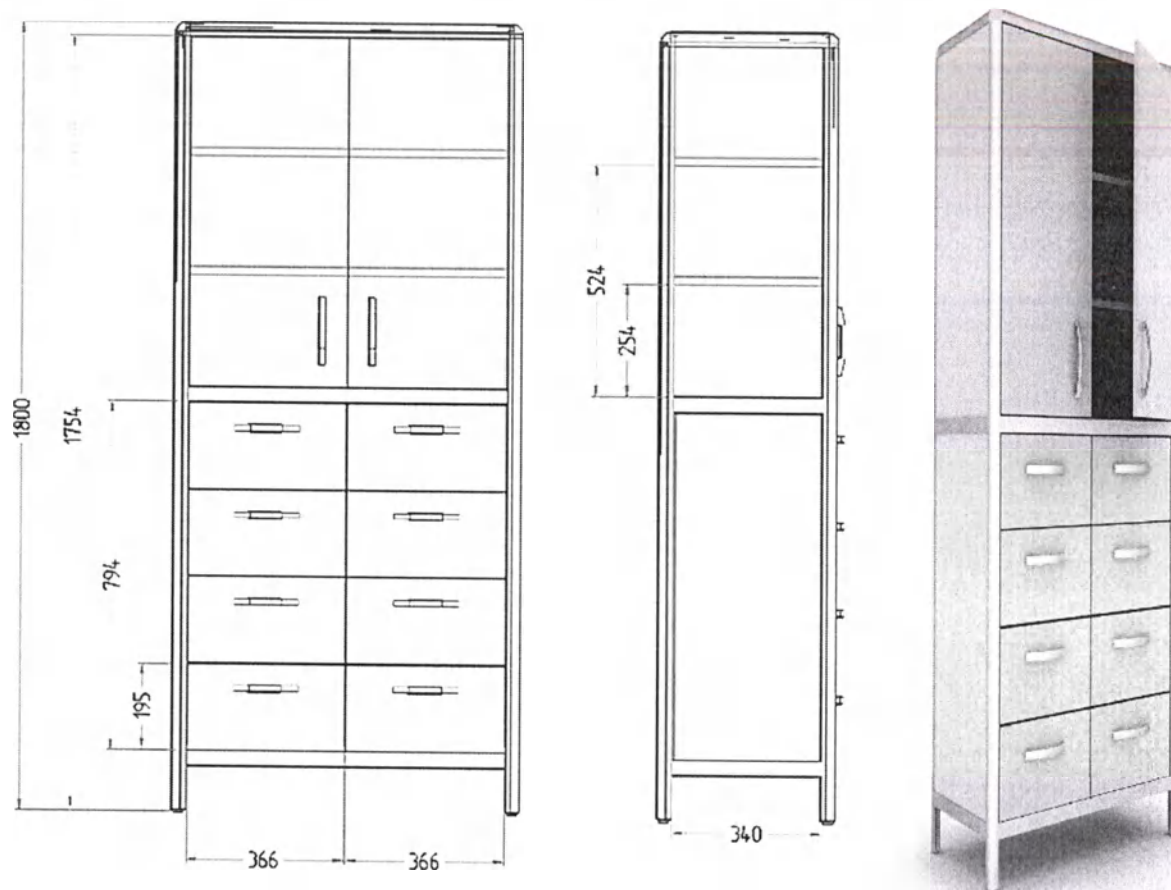


Рисунок 19 - Шкаф медицинский с восьмью выдвижными ящиками двухсекционный (Арт. Ш-019)

Таблица 19 – Размеры шкафа медицинского с восьмью выдвижными ящиками двухсекционного (Арт. Ш-019)

Размеры, мм	Ширина шкафа	Глубина шкафа	Максимальная высота шкафа	Минимальная высота шкафа	Полки верхние 2 шт.		Ящики 8 шт.	
					Ширина	Глубина	Ширина	Глубина
Размеры, мм	800	400	1830	1800	760	350	367	350

Толщина задней стенки: 16 мм.

ООО «ВИТА» 690105, Приморский край, город Владивосток, Бородинская улица, дом 46/50, офис 206 Тел.: 8 423 279-59-49; e-mail: vita@vita-vdk.ru	Документ: ПТИС.324259.001 И
	Версия: 1.3
	Страница: 24 из 67

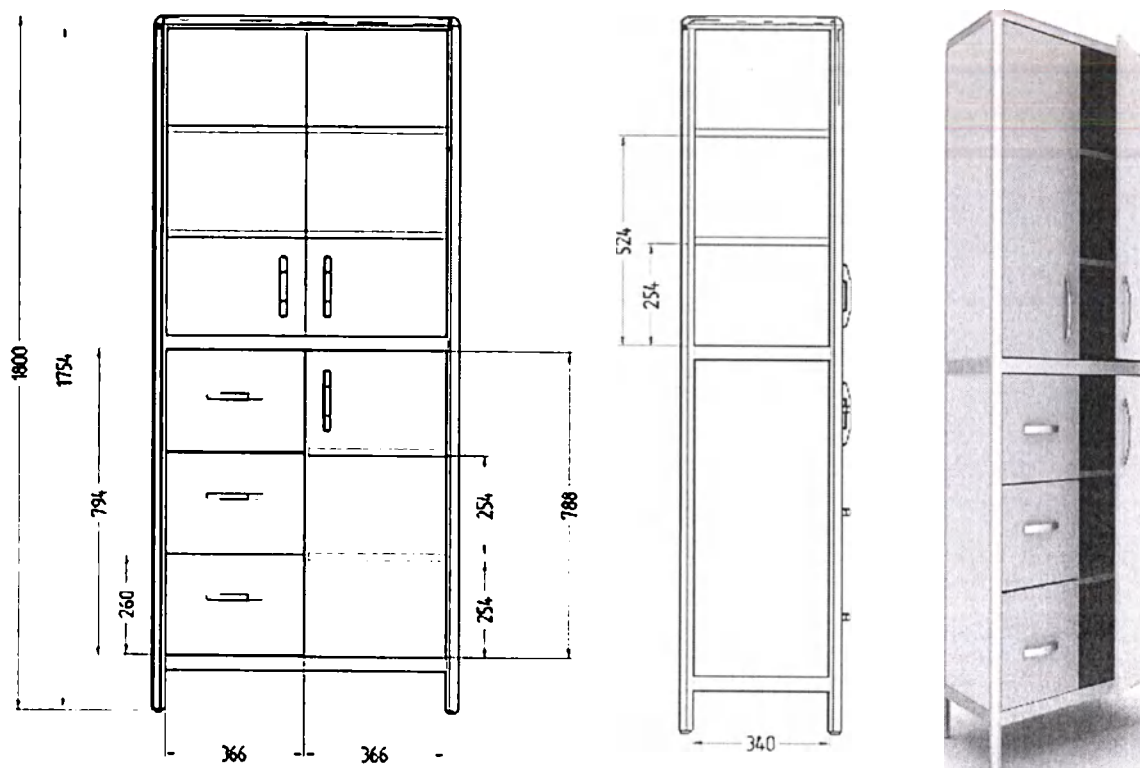


Рисунок 20 - Шкаф медицинский с тремя выдвижными ящиками
двухсекционный (Арт. Ш-020)

Таблица 20 – Размеры шкафа медицинского с тремя выдвижными ящиками
двухсекционного (Арт. Ш-020)

	Ширина шкафа	Глубина шкафа	Максималь ная высота шкафа	Минималь ная высота шкафа	Полки верхние 2 шт.		Полки нижние 2 шт.		Ящики 3 шт.	
					Ширина	Глубина	Ширина	Глубина	Ширина	Глубина
Размеры, мм	800	400	1830	1800	760	350	372	350	367	350

Толщина задней стенки: 16 мм.

ООО «ВИТА» 690105, Приморский край, город Владивосток, Бородинская улица, дом 46/50, офис 206 Тел.: 8 423 279-59-49; e-mail: vita@vita-vdk.ru	Документ: ПТИС.324259.001 И
	Версия: 1.3
	Страница: 25 из 67

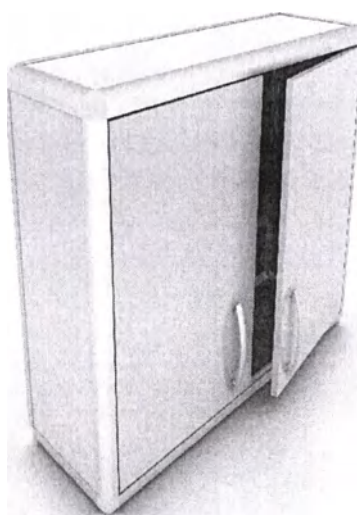
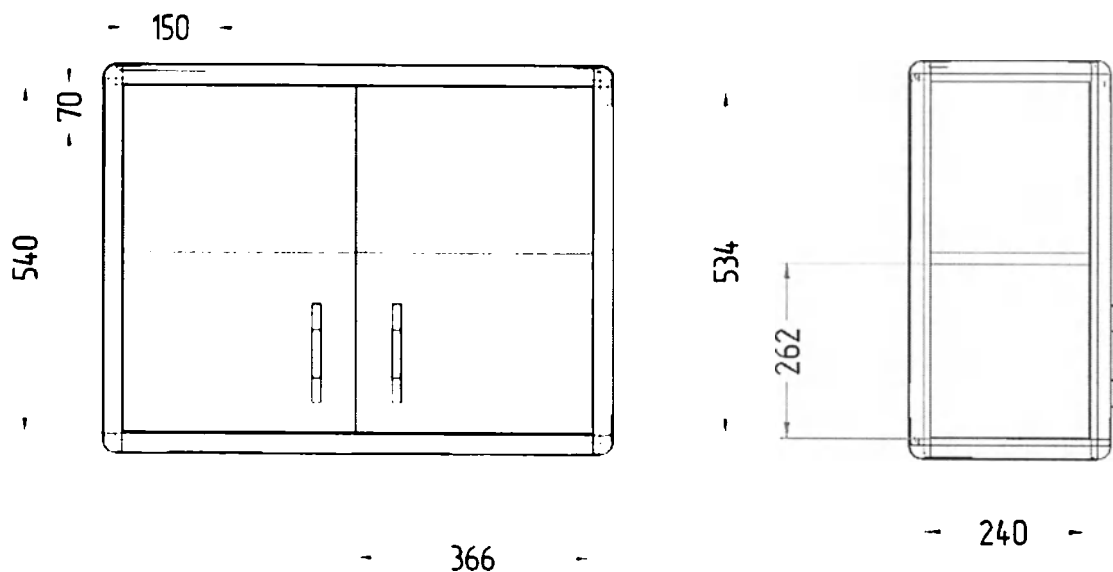


Рисунок 21 - Шкаф медицинский навесной (Арт. ШН-001)

Таблица 21 – Размеры шкафа медицинского навесного (Арт. ШН-001)

	Ширина шкафа	Глубина шкафа	Высота шкафа	Полка 1 шт.		Отверстия для крепления 2 шт.
				Ширина	Глубина	
Размеры, мм	800	300	600	760	250	8

Толщина задней стенки: 16 мм.

ООО «ВИТА» 690105, Приморский край, город Владивосток, Бородинская улица, дом 46/50, офис 206 Тел.: 8 423 279-59-49; e-mail: vita@vita-vdk.ru	Документ: ПТИС.324259.001 И
	Версия: 1.3
	Страница: 26 из 67

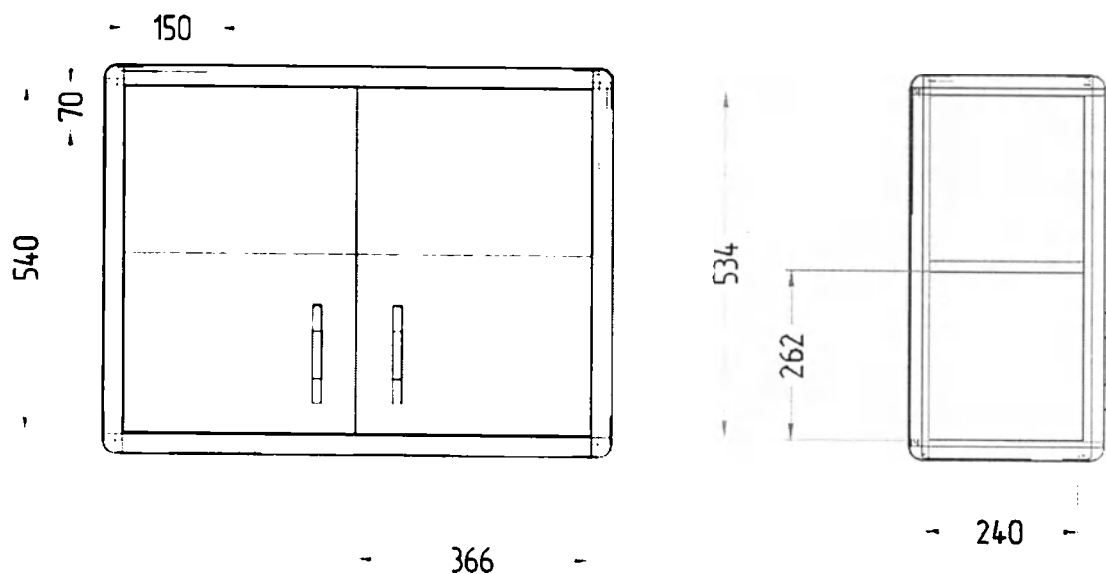


Рисунок 22 - Шкаф медицинский навесной открытый (Арт. ШН-002)

Таблица 22 – Размеры шкафа медицинского навесного открытого (Арт. ШН-002)

	Ширина шкафа	Глубина шкафа	Высота шкафа	Полка 1 шт.		Отверстия для крепления 2 шт. Диаметр
				Ширина	Глубина	
Размеры, мм	800	300	600	760	250	8

Толщина задней стенки: 16 мм.

ООО «ВИТА» 690105, Приморский край, город Владивосток, Бородинская улица, дом 46/50, офис 206 Тел.: 8 423 279-59-49; e-mail: vita@vita-vdk.ru	Документ: ПТИС.324259.001 И
	Версия: 1.3
	Страница: 27 из 67

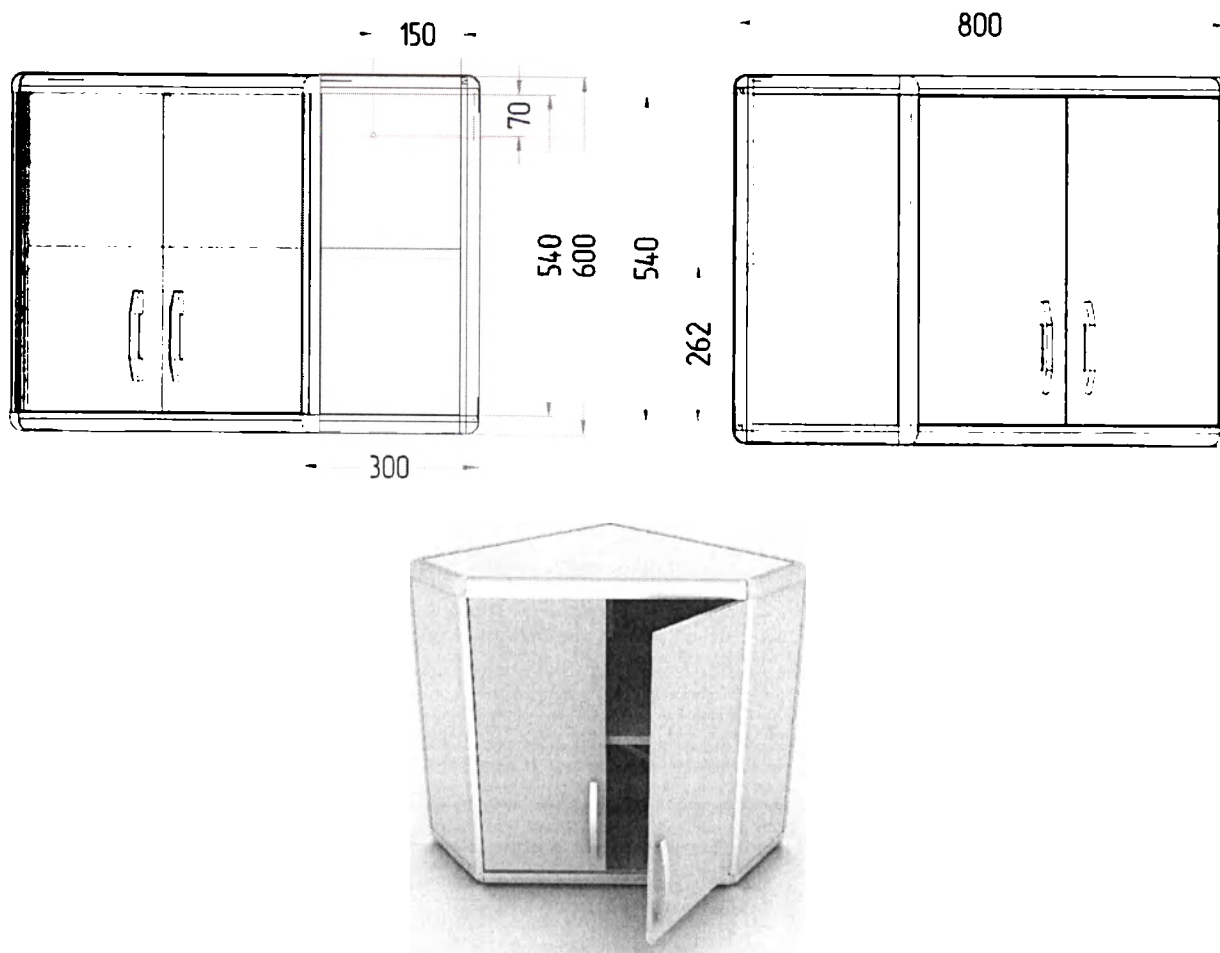


Рисунок 23 - Шкаф медицинский навесной угловой (Арт. ШН-003)

Таблица 23 – Размеры шкафа медицинского навесного углового (Арт. ШН-003)

	Ширина шкафа	Глубина шкафа	Высота шкафа	Полка 1 шт.		Отверстия для крепления 2 шт. Диаметр
				Ширина	Глубина	
Размеры, мм	800	800	600	760	760	8

Толщина задней стенки: 16 мм.

ООО «ВИТА» 690105, Приморский край, город Владивосток, Бородинская улица, дом 46/50, офис 206 Тел.: 8 423 279-59-49; e-mail: vita@vita-vdk.ru	Документ: ПТИС.324259.001 И
	Версия: 1.3
	Страница: 28 из 67

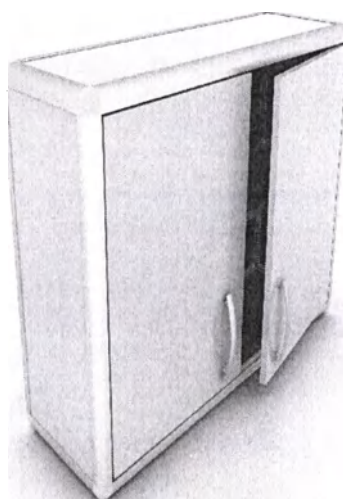
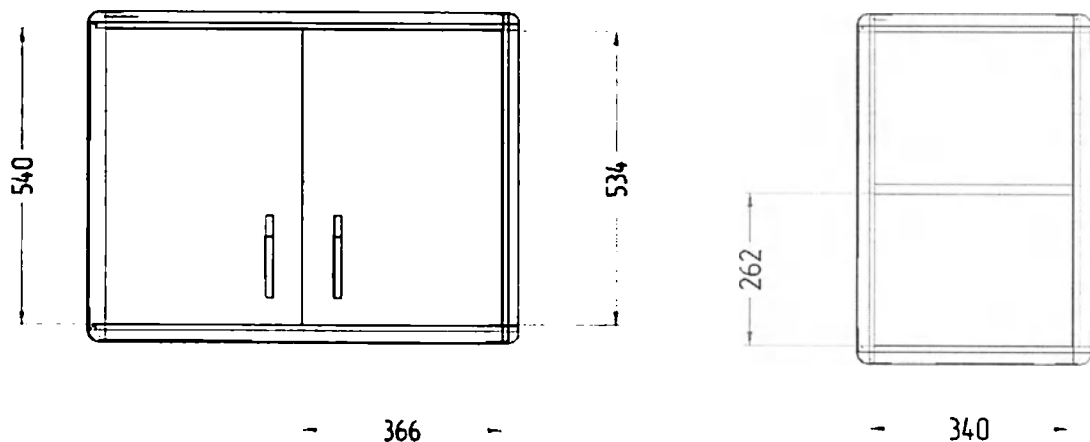


Рисунок 24 - Шкаф медицинский антресоль (Арт. ШН-004)

Таблица 24 – Размеры шкафа медицинского антресоль (Арт. ШН-004)

Размеры, мм	Ширина шкафа	Глубина шкафа	Высота шкафа	Полка 1 шт.	
				Ширина	Глубина
Размеры, мм	800	400	600	760	350

Толщина задней стенки: 16 мм.

ООО «ВИТА» 690105, Приморский край, город Владивосток, Бородинская улица, дом 46/50, офис 206 Тел.: 8 423 279-59-49; e-mail: vita@vita-vdk.ru	Документ: ПТИС.324259.001 И
	Версия: 1.3
	Страница: 29 из 67

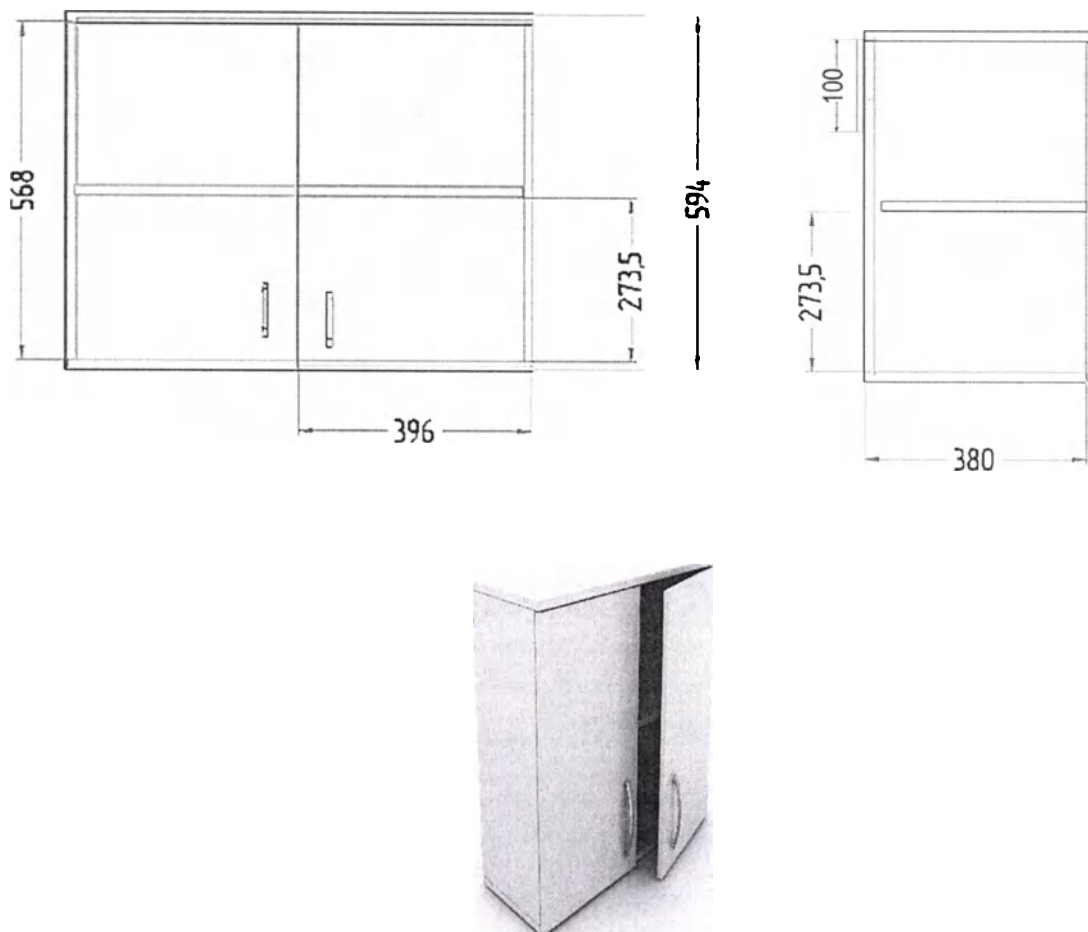


Рисунок 25 - Шкаф медицинский антресоль (Арт. ШН-005)

Таблица 25 – Размеры шкафа медицинского антресоль (Арт. ШН-005)

	Ширина шкафа	Глубина шкафа	Высота шкафа	Полка 1 шт.	
				Ширина	Глубина
Размеры, мм	800	400	600	767	350

Толщина задней стенки: 3,2 мм.

ООО «ВИТА» 690105, Приморский край, город Владивосток, Бородинская улица, дом 46/50, офис 206 Тел.: 8 423 279-59-49; e-mail: vita@vita-vdk.ru	Документ: ПТИС.324259.001 И
	Версия: 1.3
	Страница: 30 из 67

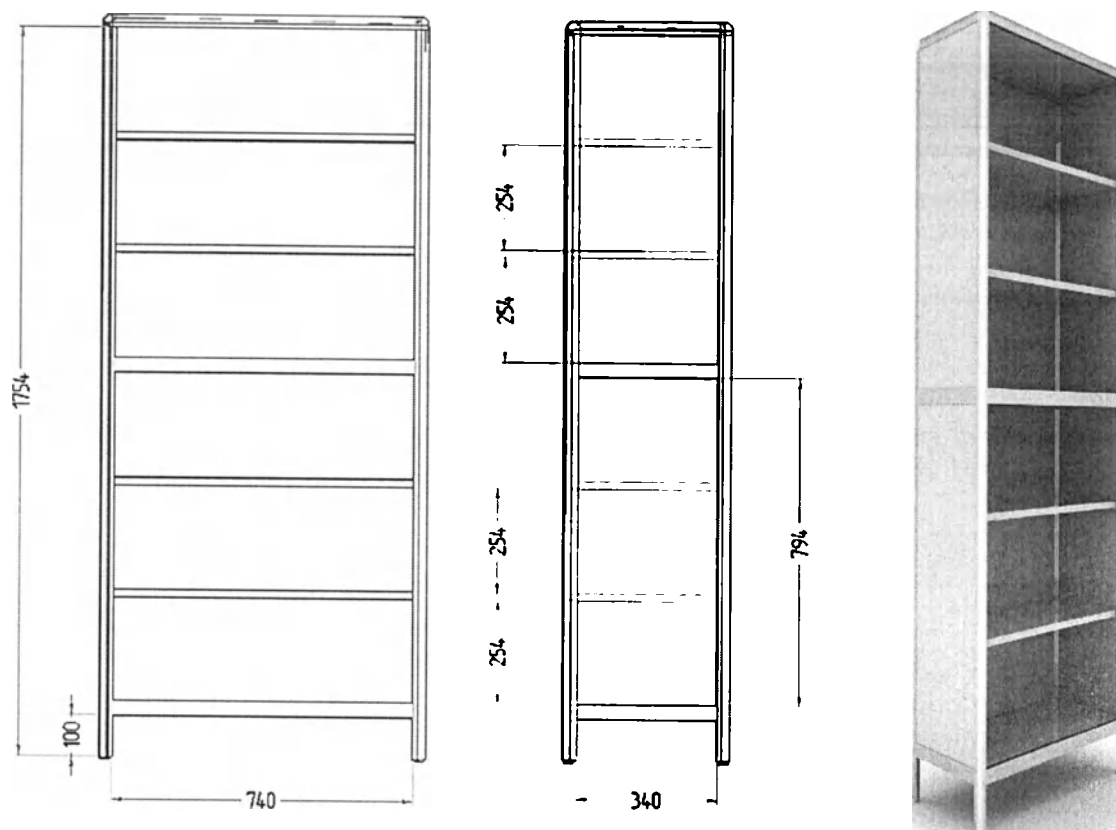


Рисунок 26 - Шкаф медицинский открытый (Арт. ШС-001)

Таблица 26 – Размеры шкафа медицинского открытого (Арт. ШС-001)

Размеры, мм	Ширина шкафа	Глубина шкафа	Максимальная высота шкафа	Минимальная высота шкафа	Полки 4 шт.	
					Ширина	Глубина
	800	400	1830	1800	760	350

Толщина задней стенки: 16 мм.

ООО «ВИТА» 690105, Приморский край, город Владивосток, Бородинская улица, дом 46/50, офис 206 Тел.: 8 423 279-59-49; e-mail: vita@vita-vdk.ru	Документ: ПТИС.324259.001 И
	Версия: 1.3
	Страница: 31 из 67

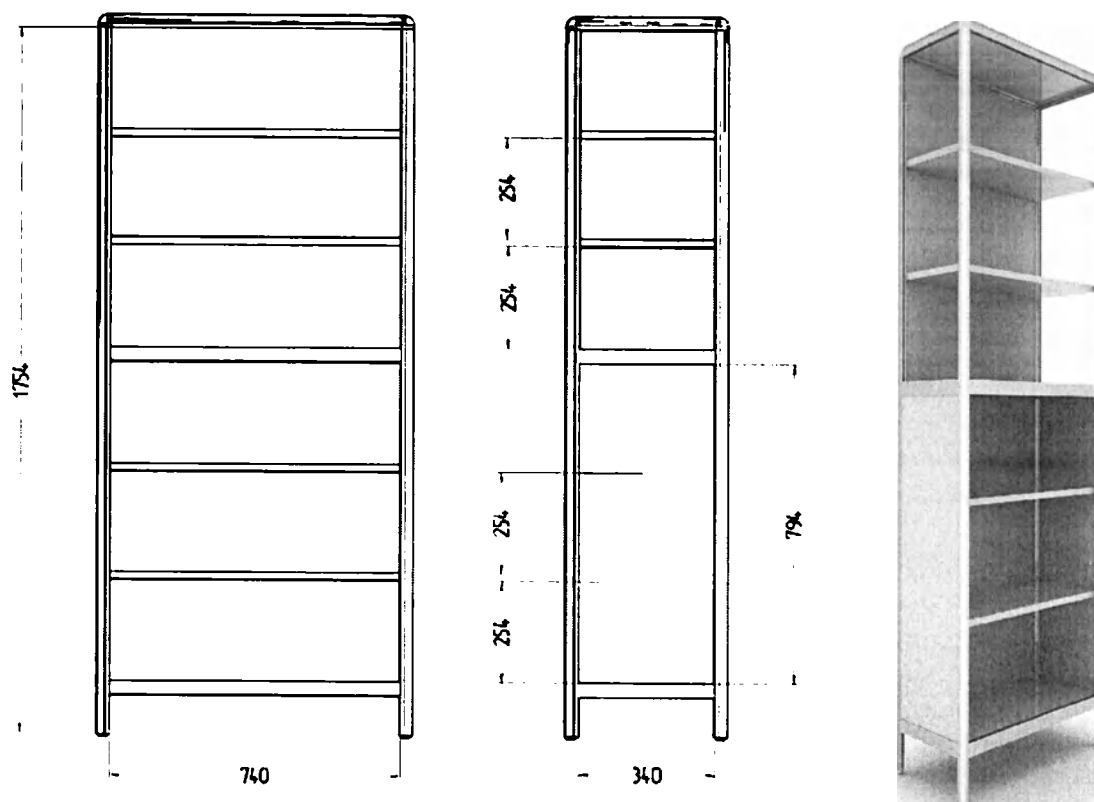


Рисунок 27 - Шкаф медицинский открытый двухсекционный (Арт. ШС-002)

Таблица 27 – Размеры шкафа медицинского открытого двухсекционного (Арт. ШС-002)

Размеры, мм	Ширина шкафа	Глубина шкафа	Максимальная высота шкафа	Минимальная высота шкафа	Полки 4 шт.	
					Ширина	Глубина
	800	400	1830	1800	760	350

Толщина задней стенки: 16 мм.

Ручка дверная (рисунок 28) является аксессуаром двери для ручного пользования и предназначена для открывания дверей/выдвижных ящиков.

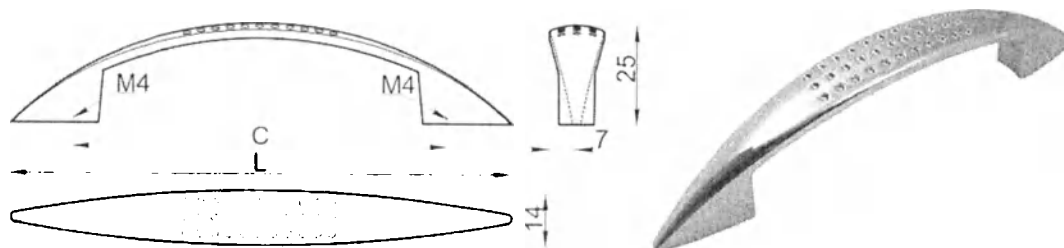


Рисунок 28 – Ручка дверная

Таблица 28 – Размеры ручки дверной

Размеры, мм	Общая длина (L)	Длина (C)
	125	96

ООО «ВИТА» 690105, Приморский край, город Владивосток, Бородинская улица, дом 46/50, офис 206 Тел.: 8 423 279-59-49; e-mail: vita@vita-vdk.ru	Документ: ПТИС.324259.001 И
	Версия: 1.3
	Страница: 32 из 67

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1 Основные параметры и характеристики

2.1.1 Шкаф соответствует требованиям ГОСТ Р 50444, ГОСТ 16371, технических условий и комплекту конструкторской документации ПТИС.324259.001 согласно таблице 29, утвержденной в установленном порядке.

2.1.2 Конструкция и внешний вид шкафа соответствуют рисункам 1 – 27.

Таблица 29- Перечень исполнений шкафов в полной (ассортиментной) номенклатуре

№	Наименование изделия, его частей	Обозначение документа ПТИС.324259.001	№ Рисунка
1.	Шкаф медицинский двухстворчатый (Арт. Ш-001)	ПТИС.324259.001-01	Рис. 1
2.	Шкаф медицинский с четырьмя дверями двухсекционный (Арт. Ш-002)	ПТИС.324259.001-02	Рис. 2
3.	Шкаф медицинский одностворчатый (Арт. Ш-003)	ПТИС.324259.001-03	Рис. 3
4.	Шкаф медицинский с двумя дверями двухсекционный (Арт. Ш-004)	ПТИС.324259.001-04	Рис. 4
5.	Шкаф медицинский комбинированный двухсекционный с четырьмя дверями (Арт. Ш-005)	ПТИС.324259.001-05	Рис. 5
6.	Шкаф медицинский комбинированный двухсекционный с двумя дверями (Арт. Ш-006)	ПТИС.324259.001-06	Рис. 6
7.	Шкаф медицинский с четырьмя выдвижными ящиками двухсекционный (Арт. Ш-007)	ПТИС.324259.001-07	Рис. 7
8.	Шкаф медицинский для одежды (Арт. Ш-008)	ПТИС.324259.001-08	Рис. 8
9.	Шкаф медицинский для одежды малый (Арт. Ш-009)	ПТИС.324259.001-09	Рис. 9
10.	Шкаф медицинский с двумя выдвижными ящиками двухсекционный (Арт. Ш-010)	ПТИС.324259.001-10	Рис. 10
11.	Шкаф медицинский с восьмью выдвижными ящиками (Арт. Ш-011)	ПТИС.324259.001-11	Рис. 11
12.	Шкаф медицинский с восьмью выдвижными ящиками односекционный (Арт. Ш-012)	ПТИС.324259.001-12	Рис. 12
13.	Шкаф медицинский двухстворчатый с перегородкой (Арт. Ш-013)	ПТИС.324259.001-13	Рис. 13
14.	Шкаф медицинский с четырьмя дверями (Арт. Ш-014)	ПТИС.324259.001-14	Рис. 14
15.	Шкаф медицинский комбинированный с четырьмя дверями (Арт. Ш-015)	ПТИС.324259.001-15	Рис. 15
16.	Шкаф медицинский с четырьмя выдвижными ящиками (Арт. Ш-016)	ПТИС.324259.001-16	Рис. 16
17.	Шкаф медицинский для одежды двухстворчатый (Арт. Ш-017)	ПТИС.324259.001-17	Рис. 17
18.	Шкаф медицинский для одежды одностворчатый (Арт. Ш-018)	ПТИС.324259.001-18	Рис. 18
19.	Шкаф медицинский с восьмью выдвижными ящиками двухсекционный (Арт. Ш-019)	ПТИС.324259.001-19	Рис. 19

ООО «ВИТА» 690105, Приморский край, город Владивосток, Бородинская улица, дом 46/50, офис 206 Тел.: 8 423 279-59-49; e-mail: vita@vita-vdk.ru	Документ: ПТИС.324259.001 И
	Версия: 1.3
	Страница: 33 из 67

№	Наименование изделия, его частей	Обозначение документа ПТИС.324259.001	№ Рисунка
20.	Шкаф медицинский с тремя выдвижными ящиками двухсекционный (Арт. Ш-020)	ПТИС.324259.001-20	Рис. 20
21.	Шкаф медицинский навесной (Арт. ШН-001)	ПТИС.324259.001-21	Рис. 21
22.	Шкаф медицинский навесной открытый (Арт. ШН-002)	ПТИС.324259.001-22	Рис. 22
23.	Шкаф медицинский навесной угловой (Арт. ШН-003)	ПТИС.324259.001-23	Рис. 23
24.	Шкаф медицинский антресоль (Арт. ШН-004)	ПТИС.324259.001-24	Рис. 24
25.	Шкаф медицинский антресоль (Арт. ШН-005)	ПТИС.324259.001-25	Рис. 25
26.	Шкаф медицинский открытый (Арт. ШС-001)	ПТИС.324259.001-26	Рис. 26
27.	Шкаф медицинский открытый двухсекционный (Арт. ШС-002)	ПТИС.324259.001-27	Рис. 27

2.1.3 Габаритные размеры и масса шкафа соответствуют значениям, указанным в таблице 30. Для шкафов, кроме Арт. ШН-001 - Арт. ШН-005, габаритные размеры указаны с регулируемыми опорами во вкрученном состоянии. Предельное отклонение габаритных размеров шкафа ± 4 мм.

Таблица 30 – Массогабаритные характеристики шкафа

№	Наименование изделия	Габаритные размеры (Ш×Г×В), мм	Масса, не более, кг
1.	Шкаф медицинский двухстворчатый (Арт. Ш-001)	800×400×1800	72,0
2.	Шкаф медицинский с четырьмя дверями двухсекционный (Арт. Ш-002)	800×400×1800	72,0
3.	Шкаф медицинский одностворчатый (Арт. Ш-003)	432×400×1800	47,0
4.	Шкаф медицинский с двумя дверями двухсекционный (Арт. Ш-004)	432×400×1800	47,2
5.	Шкаф медицинский комбинированный двухсекционный с четырьмя дверями (Арт. Ш-005)	800×400×1800	71,0
6.	Шкаф медицинский комбинированный двухсекционный с двумя дверями (Арт. Ш-006)	432×400×1800	46,7
7.	Шкаф медицинский с четырьмя выдвижными ящиками двухсекционный (Арт. Ш-007)	800×400×1800	88,4
8.	Шкаф медицинский для одежды (Арт. Ш-008)	800×550×1800	69,3
9.	Шкаф медицинский для одежды малый (Арт. Ш-009)	432×550×1800	48,5
10.	Шкаф медицинский с двумя выдвижными ящиками двухсекционный (Арт. Ш-010)	800×400×1800	78,0
11.	Шкаф медицинский с восьмью выдвижными ящиками (Арт. Ш-011)	800×400×1300	71,2
12.	Шкаф медицинский с восьмью выдвижными ящиками односекционный (Арт. Ш-012)	432×400×1300	51,2
13.	Шкаф медицинский двухстворчатый с перегородкой (Арт. Ш-013)	800×400×1800	69,0
14.	Шкаф медицинский с четырьмя дверями (Арт. Ш-014)	800×400×1800	59,0

ООО «ВИТА» 690105, Приморский край, город Владивосток, Бородинская улица, дом 46/50, офис 206 Тел.: 8 423 279-59-49; e-mail: vita@vita-vdk.ru	Документ: ПТИС.324259.001 И
	Версия: 1.3
	Страница: 34 из 67

№	Наименование изделия	Габаритные размеры (Ш×Г×В), мм	Масса, не более, кг
15.	Шкаф медицинский комбинированный с четырьмя дверями (Арт. Ш-015)	800×400×1800	57,8
16.	Шкаф медицинский с четырьмя выдвижными ящиками (Арт. Ш-016)	800×400×1800	75,0
17.	Шкаф медицинский для одежды двухстворчатый (Арт. Ш-017)	800×550×1800	60,5
18.	Шкаф медицинский для одежды одностворчатый (Арт. Ш-018)	400×550×1800	41,3
19.	Шкаф медицинский с восьмью выдвижными ящиками двухсекционный (Арт. Ш-019)	800×400×1800	95,6
20.	Шкаф медицинский с тремя выдвижными ящиками двухсекционный (Арт. Ш-020)	800×400×1800	83,0
21.	Шкаф медицинский навесной (Арт. ШН-001)	800×300×600	28,3
22.	Шкаф медицинский навесной открытый (Арт. ШН-002)	800×300×600	25,7
23.	Шкаф медицинский навесной угловой (Арт. ШН-003)	800×800×600	42,3
24.	Шкаф медицинский антресоль (Арт. ШН-004)	800×400×600	31,2
25.	Шкаф медицинский антресоль (Арт. ШН-005)	800×400×600	29,3
26.	Шкаф медицинский открытый (Арт. ШС-001)	800×400×1800	55,7
27.	Шкаф медицинский открытый двухсекционный (Арт. ШС-002)	800×400×1800	42,6

2.1.4 Зазоры в проемах на сторону, не предусмотренные технической документацией на изделия, не превышают значений по ГОСТ 16371.

2.1.5 Покоробленность щитовых деталей шкафа по ГОСТ 16371.

2.1.6 На видимой поверхности шкафа отсутствуют дефекты по ГОСТ 20400: расхождения полос облицовки, нахлестки, отслоения, пузыри под облицовкой, клеевые пятна, шлифовка, потертость, загрязнение поверхности, вырывы, вмятины, царапины, трещины, пятна, потеки клея, заусенцы и морщины.

2.1.7 Толщина стенок шкафа (кроме задней), дверей и полок 16 мм. Допускаемое отклонение $\pm 0,5$ мм.

2.1.8 Толщина задней стенки шкафа соответствует требованиям п. 1.6.

2.1.9 В шкафах Арт. Ш-005, Арт Ш-006, Арт Ш-015, Арт ШН-002 толщина дверей из стекла 4 мм. Допустимое отклонение $\pm 0,5$ мм.

2.1.10 Полки шкафов и днища ящиков выдерживают двукратную номинальную равномерно распределенную нагрузку. За номинальную принимают нагрузку массой:

- на полку 10 ± 1 кг;
- на дно ящика 5 ± 1 кг.

2.1.11 Количество и размеры полок и ящиков, а также их расположение соответствуют требованиям, приведенным в п. 1.6. Предельные отклонения размеров ± 2 мм.

2.1.12 Внешний вид и размеры штанги для вешалок соответствуют требованиям, приведенным в п. 1.6. Допустимое отклонение от размеров ± 10 %.

ООО «ВИТА» 690105, Приморский край, город Владивосток, Бородинская улица, дом 46/50, офис 206 Тел.: 8 423 279-59-49; e-mail: vita@vita-vdk.ru	Документ: ПТИС.324259.001 И
	Версия: 1.3
	Страница: 35 из 67

2.1.13 Штанга для вешалок выдерживает двукратную номинальную нагрузку. За номинальную принимают нагрузку массой: 25 ± 1 кг.

2.1.14 Шкаф устойчиво стоит на опорах. Зазор между одной из опор и поверхностью пола не превышает 3 мм.

2.1.15 Опоры шкафов Ар. Ш-001 – Арт. Ш-012, Арт. Ш-019, Арт. Ш-020, Арт. ШС-001 и Арт. ШС-002 должны обеспечивать регулировку по высоте до 30 мм.

2.1.16 Опоры шкафов Ар. Ш-013 – Арт. Ш-018 должны обеспечивать регулировку по высоте до 15 мм.

2.1.17 Дверцы шкафа открываются и закрываются плавно, без перекосов, с усилием не более 20 Н.

2.1.18 Выдвижные ящики шкафа имеют свободный ход без заеданий и перекосов, с усилием выдвигания не более 30 Н.

2.1.19 Ящики имеют устройство для предотвращения выпадения их из корпуса.

2.1.20 Шкаф устойчив при приложении нагрузки на открытую дверцу 45 Н, либо при приложении нагрузки на выдвинутый ящик 75 Н.

2.1.21 Петли дверей интегрированы в алюминиевый профиль и обеспечивают открывание дверей на 175 ± 2 градусов.

2.1.22 Замки на дверцах неподвижно и прочно закреплены и установлены так, чтобы обеспечивалось их легкое отпирание и запирание. Замки обеспечивают плотное прилегание дверей к корпусу шкафа.

2.1.23 Навесной шкаф имеет на задней стенке отверстия, предназначенные для крепления, диаметром 8 мм.

2.1.24 Навесной шкаф, закрепленный на стене, выдерживает нагрузку не менее 120 Н.

2.1.25 Шкаф, имеющий самопритягивающиеся (инерционные) мебельные петли, обеспечивает предотвращение самопроизвольного открывания дверей и возвращение дверец на определенное место без дополнительных усилий.

2.1.26 Защитные и защитно-декоративные покрытия для поверхностей деталей из металла по ГОСТ 9.032, ГОСТ 9.301, ГОСТ 9.303 для изделий группы условий 1.

2.1.27 Наружные поверхности шкафа устойчивы к дезинфекции по МУ 287-113 (3 % раствором перекиси водорода ГОСТ 177 с добавлением 0,5 % универсального моющего средства типа «Лотос» ГОСТ 25644 или 1 % раствором хлорамина по ТУ 9392-031-00203306-2003).

2.1.28 Шкаф при эксплуатации устойчив к воздействию климатических факторов внешней среды в соответствии с требованиями для изделий исполнения УХЛ4.2 по ГОСТ 15150.

2.1.29 При транспортировании шкаф в транспортной таре обладает устойчивостью к воздействию климатических факторов по ГОСТ 15150 для условий хранения 5.

2.1.30 Шкаф в транспортной таре обладает устойчивостью к воздействию климатических факторов при хранении в крытых помещениях отправителя (получателя) по ГОСТ 16371 при температуре не ниже плюс 2 °С и относительной влажности воздуха от 45% до 70%.

ООО «ВИТА» 690105, Приморский край, город Владивосток, Бородинская улица, дом 46/50, офис 206 Тел.: 8 423 279-59-49; e-mail: vita@vita-vdk.ru	Документ: ПТИС.324259.001 И
	Версия: 1.3
	Страница: 36 из 67

2.1.31 Шкаф в транспортной упаковке обладает устойчивостью к механическим воздействиям при транспортировании соответствующим ГОСТ Р 50444.

2.2 Требования к сырью, материалам и покупным изделиям

2.2.1 Материалы, сырье и покупные изделия, применяемые при изготовлении шкафа, соответствуют требованиям стандартов или технических условий на эти материалы, сырье и покупные изделия, предусмотренные действующим законодательством, и имеют сопроводительные документы о качестве предприятия-поставщика.

2.2.2 Входной контроль сырья, материалов и покупных изделий, применяемых при производстве шкафа, проводится в соответствии с требованиями ГОСТ 24297.

2.2.3 Для изготовления шкафа используется сырье, материалы и покупные изделия согласно таблице 31. Допускается применение материалов другого изготовителя, после прохождения необходимых испытаний, а также при условии неизменности конструктивных и функциональных характеристик, требований безопасности п. 3.1, соответствии материалов требованиям п. 2.2.1, 2.2.2.

Таблица 31 – Сырье и материалы

Наименование изделия	Наименование составных частей	Наименование, марка, изготовитель материала
– Шкаф медицинский двухстворчатый (Арт. Ш-001); – Шкаф медицинский с четырьмя дверями двухсекционный (Арт. Ш-002); – Шкаф медицинский одностворчатый (Арт. Ш-003); – Шкаф медицинский с двумя дверями двухсекционный (Арт. Ш-004)	Каркас	Профиль прессованный из алюминиевых сплавов марок: АД31(состояние материала Т1, Т5), AlMgO, 7Si 6063 (состояние материала Т5, Т6, Т66) анодированный, производитель ООО «Донской Алюминий», Россия
	Стенки, двери, полки	Плиты древесно-стружечные, облицованные пленками на основе термореактивных полимеров, группы качества А, Б, класс по выделению формальдегида Е1. ГОСТ 32289, производитель ООО «Томлесдрев», Россия или Плиты древесно-стружечные, облицованные пленками на основе термореактивных полимеров торговой марки Eurodekor, класс эмиссии формальдегида Е1 по ГОСТ 32289, производитель ООО «ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ ШУЯ», Россия
	Ручки	Нержавеющая сталь марки 08Х18Н10 (ГОСТ 5632), производства ООО «Боярд», Россия
	Опоры	Профиль прессованный из алюминиевых сплавов марок: АД31(состояние материала Т1, Т5), AlMgO, 7Si 6063 (состояние материала Т5, Т6, Т66) анодированный, производитель ООО «Донской Алюминий», Россия
– Шкаф медицинский комбинированный двухсекционный с	Каркас	Профиль прессованный из алюминиевых сплавов марок: АД31(состояние материала Т1, Т5), AlMgO, 7Si 6063 (состояние материала Т5, Т6, Т66) анодированный, производитель ООО «Донской Алюминий», Россия

ООО «ВИТА» 690105, Приморский край, город Владивосток, Бородинская улица, дом 46/50, офис 206 Тел.: 8 423 279-59-49; e-mail: vita@vita-vdk.ru	Документ: ПТИС.324259.001 И
	Версия: 1.3
	Страница: 37 из 67

Наименование изделия	Наименование составных частей	Наименование, марка, изготовитель материала
четыремя дверями (Арт. Ш-005); – Шкаф медицинский комбинированный двухсекционный с двумя дверями (Арт. Ш-006)	Стенки, полки	Плиты древесно-стружечные, облицованные пленками на основе термореактивных полимеров, группы качества А, Б, класс по выделению формальдегида Е1. ГОСТ 32289, производитель ООО «Томлесдрев», Россия или Плиты древесно-стружечные, облицованные пленками на основе термореактивных полимеров торговой марки Eurodekor, класс эмиссии формальдегида Е1 по ГОСТ 32289, производитель ООО «ЭГТЕР ДРЕВПРОДУКТ ШУЯ», Россия Кромка мебельная из полимерных материалов (ПВХ/АБС-пластик/ПП) серии RAUKANTEX Kantenband, производства «Rehau AG+CO», Германия
	Двери	Плиты древесно-стружечные, облицованные пленками на основе термореактивных полимеров, группы качества А, Б, класс по выделению формальдегида Е1. ГОСТ 32289, производитель ООО «Томлесдрев», Россия или Плиты древесно-стружечные, облицованные пленками на основе термореактивных полимеров торговой марки Eurodekor, класс эмиссии формальдегида Е1 по ГОСТ 32289, производитель ООО «ЭГТЕР ДРЕВПРОДУКТ ШУЯ», Россия Кромка мебельная из полимерных материалов (ПВХ/АБС-пластик/ПП) серии RAUKANTEX Kantenband, производства «Rehau AG+CO», Германия Стекло листовое бесцветное, марки М0, М1, М4 толщиной 4,0 мм по ГОСТ 111, производства АО «Каспийский завод листового стекла», Россия
	Ручки	Нержавеющая сталь марки 08Х18Н10 (ГОСТ 5632), производства ООО «Боярд», Россия
	Опоры	Профиль прессованный из алюминиевых сплавов марок: АД31(состояние материала Т1, Т5), AlMgO, 7Si 6063 (состояние материала Т5, Т6, Т66) анодированный, производитель ООО «Донской Алюминий», Россия
	Каркас	Профиль прессованный из алюминиевых сплавов марок: АД31(состояние материала Т1, Т5), AlMgO, 7Si 6063 (состояние материала Т5, Т6, Т66) анодированный, производитель ООО «Донской Алюминий», Россия
– Шкаф медицинский с четыремя выдвижными ящиками двухсекционный (Арт. Ш-007); – Шкаф медицинский с двумя выдвижными ящиками двухсекционный (Арт. Ш-010); – Шкаф медицинский с восьмью выдвижными ящиками двухсекционный (Арт. Ш-019);	Стенки, двери, полки, ящики	Плиты древесно-стружечные, облицованные пленками на основе термореактивных полимеров, группы качества А, Б, класс по выделению формальдегида Е1. ГОСТ 32289, производитель ООО «Томлесдрев», Россия или Плиты древесно-стружечные, облицованные пленками на основе термореактивных полимеров торговой марки Eurodekor, класс эмиссии формальдегида Е1 по ГОСТ 32289, производитель ООО «ЭГТЕР ДРЕВПРОДУКТ ШУЯ», Россия Кромка мебельная из полимерных материалов (ПВХ/АБС-пластик/ПП) серии RAUKANTEX Kantenband, производства «Rehau AG+CO», Германия
	Ручки	Нержавеющая сталь марки 08Х18Н10 (ГОСТ 5632), производства ООО «Боярд», Россия

ООО «ВИТА» 690105, Приморский край, город Владивосток, Бородинская улица, дом 46/50, офис 206 Тел.: 8 423 279-59-49; e-mail: vita@vita-vdk.ru	Документ: ПТИС.324259.001 И
	Версия: 1.3
	Страница: 38 из 67

Наименование изделия	Наименование составных частей	Наименование, марка, изготовитель материала
– Шкаф медицинский с тремя выдвижными ящиками двухсекционный (Арт. Ш-020)	Опоры	Профиль прессованный из алюминиевых сплавов марок: АД31(состояние материала Т1, Т5), AlMgO, 7Si 6063 (состояние материала Т5, Т6, Т66) анодированный, производитель ООО «Донской Алюминий», Россия
– Шкаф медицинский для одежды (Арт. Ш-008); – Шкаф медицинский для одежды малый (Арт. Ш-009)	Каркас	Профиль прессованный из алюминиевых сплавов марок: АД31(состояние материала Т1, Т5), AlMgO, 7Si 6063 (состояние материала Т5, Т6, Т66) анодированный, производитель ООО «Донской Алюминий», Россия
	Стенки, двери, полка	Плиты древесно-стружечные, облицованные пленками на основе термореактивных полимеров, группы качества А, Б, класс по выделению формальдегида Е1. ГОСТ 32289, производитель ООО «Томлесдрев», Россия или Плиты древесно-стружечные, облицованные пленками на основе термореактивных полимеров торговой марки Eurodekor, класс эмиссии формальдегида Е1 по ГОСТ 32289, производитель ООО «ЭГТЕР ДРЕВПРОДУКТ ШУЯ», Россия Кромка мебельная из полимерных материалов (ПВХ/АБС-пластик/ПП) серии RAUKANTEX Kantenband, производства «Rehau AG+CO», Германия
	Штанга для вешалок	Труба 25 мм TR03/2,5*300/1CP/1 хромированная стальная, Нержавеющая сталь марки 08Х18Н10 (ГОСТ 5632), производства ООО «Боярд», Россия
	Ручки	Нержавеющая сталь марки 08Х18Н10 (ГОСТ 5632), производства ООО «Боярд», Россия
	Опоры	Профиль прессованный из алюминиевых сплавов марок: АД31(состояние материала Т1, Т5), AlMgO, 7Si 6063 (состояние материала Т5, Т6, Т66) анодированный, производитель ООО «Донской Алюминий», Россия
– Шкаф медицинский с восьмью выдвижными ящиками (Арт. Ш-011); – Шкаф медицинский с восьмью выдвижными ящиками односекционный (Арт. Ш-012)	Каркас	Профиль прессованный из алюминиевых сплавов марок: АД31(состояние материала Т1, Т5), AlMgO, 7Si 6063 (состояние материала Т5, Т6, Т66) анодированный, производитель ООО «Донской Алюминий», Россия
	Стенки	Плиты древесно-стружечные, облицованные пленками на основе термореактивных полимеров, группы качества А, Б, класс по выделению формальдегида Е1. ГОСТ 32289, производитель ООО «Томлесдрев», Россия или Плиты древесно-стружечные, облицованные пленками на основе термореактивных полимеров торговой марки Eurodekor, класс эмиссии формальдегида Е1 по ГОСТ 32289, производитель ООО «ЭГТЕР ДРЕВПРОДУКТ ШУЯ», Россия
	Ящики	Плиты древесно-стружечные, облицованные пленками на основе термореактивных полимеров, группы качества А, Б, класс по выделению формальдегида Е1. ГОСТ 32289, производитель ООО «Томлесдрев», Россия или Плиты древесно-стружечные, облицованные пленками на основе термореактивных полимеров торговой марки Eurodekor, класс эмиссии формальдегида Е1 по ГОСТ 32289, производитель ООО «ЭГТЕР ДРЕВПРОДУКТ ШУЯ», Россия

ООО «ВИТА» 690105, Приморский край, город Владивосток, Бородинская улица, дом 46/50, офис 206 Тел.: 8 423 279-59-49; e-mail: vita@vita-vdk.ru	Документ: ПТИС.324259.001 И
	Версия: 1.3
	Страница: 39 из 67

Наименование изделия	Наименование составных частей	Наименование, марка, изготовитель материала
		Кромка мебельная из полимерных материалов (ПВХ/АБС-пластик/ПП) серии RAUKANTEX Kantenband, производства «Rehau AG+CO», Германия
	Ручки	Нержавеющая сталь марки 08Х18Н10 (ГОСТ 5632), производства: ООО «Боярд», Россия
	Опоры	Профиль прессованный из алюминиевых сплавов марок: АД31(состояние материала Т1, Т5), AlMgO, 7Si 6063 (состояние материала Т5, Т6, Т66) анодированный, производитель ООО «Донской Алюминий», Россия
– Шкаф медицинский двухстворчатый с перегородкой (Арт. Ш-013); – Шкаф медицинский с четырьмя дверями (Арт. Ш-014)	Стенки, двери, полки	Плиты древесно-стружечные, облицованные пленками на основе термореактивных полимеров, группы качества А, Б, класс по выделению формальдегида Е1. ГОСТ 32289, производитель ООО «Томлесдрев», Россия или Плиты древесно-стружечные, облицованные пленками на основе термореактивных полимеров торговой марки Eurodekor, класс эмиссии формальдегида Е1 по ГОСТ 32289, производитель ООО «ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ ШУЯ», Россия
		Кромка мебельная из полимерных материалов (ПВХ/АБС-пластик/ПП) серии RAUKANTEX Kantenband, производства «Rehau AG+CO», Германия
		Ручки
	Опоры	Мебельная опора N301CP/SC.1 хромированная Нержавеющая сталь марки 08Х18Н10 (ГОСТ 5632), производства: ООО «Боярд», Россия
– Шкаф медицинский комбинированный с четырьмя дверями (Арт. Ш-015)	Стенки, полки	Плиты древесно-стружечные, облицованные пленками на основе термореактивных полимеров, группы качества А, Б, класс по выделению формальдегида Е1. ГОСТ 32289, производитель ООО «Томлесдрев», Россия или Плиты древесно-стружечные, облицованные пленками на основе термореактивных полимеров торговой марки Eurodekor, класс эмиссии формальдегида Е1 по ГОСТ 32289, производитель ООО «ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ ШУЯ», Россия
		Кромка мебельная из полимерных материалов (ПВХ/АБС-пластик/ПП) серии RAUKANTEX Kantenband, производства «Rehau AG+CO», Германия
		Двери
	Кромка мебельная из полимерных материалов (ПВХ/АБС-пластик/ПП) серии RAUKANTEX Kantenband, производства «Rehau AG+CO», Германия	
	Стекло листовое бесцветное, марки М0, М1, М4 толщиной 4,0 мм по ГОСТ 111, производства АО «Каспийский завод листового стекла», Россия	

ООО «ВИТА» 690105, Приморский край, город Владивосток, Бородинская улица, дом 46/50, офис 206 Тел.: 8 423 279-59-49; e-mail: vita@vita-vdk.ru	Документ: ПТИС.324259.001 И
	Версия: 1.3
	Страница: 40 из 67

Наименование изделия	Наименование составных частей	Наименование, марка, изготовитель материала
– Шкаф медицинский с четырьмя выдвижными ящиками (Арт. Ш-016)	Ручки	Нержавеющая сталь марки 08Х18Н10 (ГОСТ 5632), производства: ООО «Боярд», Россия
	Опоры	Мебельная опора N301CP/SC.1 хромированная Нержавеющая сталь марки 08Х18Н10 (ГОСТ 5632) производства: ООО «Боярд», Россия
	Стенки, двери, полки, ящики	Плиты древесно-стружечные, облицованные пленками на основе термореактивных полимеров, группы качества А, Б, класс по выделению формальдегида Е1. ГОСТ 32289, производитель ООО «Томлесдрев», Россия или Плиты древесно-стружечные, облицованные пленками на основе термореактивных полимеров торговой марки Eurodekor, класс эмиссии формальдегида Е1 по ГОСТ 32289, производитель ООО «ЭГТЕР ДРЕВПРОДУКТ ШУЯ», Россия Кромка мебельная из полимерных материалов (ПВХ/АБС-пластик/ПП) серии RAUKANTEX Kantenband, производства «Rehau AG+CO», Германия
	Ручки	Нержавеющая сталь марки 08Х18Н10 (ГОСТ 5632), производства: ООО «Боярд», Россия
– Шкаф медицинский для одежды двухстворчатый (Арт. Ш-017); – Шкаф медицинский для одежды одностворчатый (Арт. Ш-018)	Опоры	Мебельная опора N301CP/SC.1 хромированная Нержавеющая сталь марки 08Х18Н10 (ГОСТ 5632), производства ООО «Боярд», Россия
	Стенки, двери, полка	Плиты древесно-стружечные, облицованные пленками на основе термореактивных полимеров, группы качества А, Б, класс по выделению формальдегида Е1. ГОСТ 32289, производитель ООО «Томлесдрев», Россия или Плиты древесно-стружечные, облицованные пленками на основе термореактивных полимеров торговой марки Eurodekor, класс эмиссии формальдегида Е1 по ГОСТ 32289, производитель ООО «ЭГТЕР ДРЕВПРОДУКТ ШУЯ», Россия Кромка мебельная из полимерных материалов (ПВХ/АБС-пластик/ПП) серии RAUKANTEX Kantenband, производства «Rehau AG+CO», Германия
	Штанга для вешалок	Труба 25 мм TR03/2,5*300/1CP/1 хромированная стальная, Нержавеющая сталь марки 08Х18Н10 (ГОСТ 5632), производства: ООО «Боярд», Россия
	Ручки	Нержавеющая сталь марки 08Х18Н10 (ГОСТ 5632), производства: ООО «Боярд», Россия
– Шкаф медицинский навесной (Арт. ШН-001);	Опоры	Мебельная опора N301CP/SC.1 хромированная Нержавеющая сталь марки 08Х18Н10 (ГОСТ 5632), производства: ООО «Боярд», Россия
	Каркас	Профиль прессованный из алюминиевых сплавов марок: АД31(состояние материала Т1, Т5), А1МgО, 7Si 6063 (состояние материала Т5, Т6, Т66) анодированный, производитель ООО «Донской Алюминий», Россия

ООО «ВИТА» 690105, Приморский край, город Владивосток, Бородинская улица, дом 46/50, офис 206 Тел.: 8 423 279-59-49; e-mail: vita@vita-vdk.ru	Документ: ПТИС.324259.001 И
	Версия: 1.3
	Страница: 41 из 67

Наименование изделия	Наименование составных частей	Наименование, марка, изготовитель материала
– Шкаф медицинский навесной угловой (Арт. ШН-003); – Шкаф медицинский антресоль (Арт. ШН-004)	Стенки, двери, полка	Плиты древесно-стружечные, облицованные пленками на основе термореактивных полимеров, группы качества А, Б, класс по выделению формальдегида Е1. ГОСТ 32289, производитель ООО «Томлесдрев», Россия или Плиты древесно-стружечные, облицованные пленками на основе термореактивных полимеров торговой марки Eurodekor, класс эмиссии формальдегида Е1 по ГОСТ 32289, производитель ООО «ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ ШУЯ», Россия Кромка мебельная из полимерных материалов (ПВХ/АБС-пластик/ПП) серии RAUKANTEX Kantenband, производства «Rehau AG+CO», Германия
	Ручки	Нержавеющая сталь марки 08Х18Н10 (ГОСТ 5632), производства: ООО «Боярд», Россия
– Шкаф медицинский навесной открытый (Арт. ШН-002)	Каркас	Профиль прессованный из алюминиевых сплавов марок: АД31(состояние материала Т1, Т5), А1МgО, 7Si 6063 (состояние материала Т5, Т6, Т66) анодированный, производитель ООО «Донской Алюминий», Россия
	Стенки, полки	Плиты древесно-стружечные, облицованные пленками на основе термореактивных полимеров, группы качества А, Б, класс по выделению формальдегида Е1. ГОСТ 32289, производитель ООО «Томлесдрев», Россия или Плиты древесно-стружечные, облицованные пленками на основе термореактивных полимеров торговой марки Eurodekor, класс эмиссии формальдегида Е1 по ГОСТ 32289, производитель ООО «ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ ШУЯ», Россия Кромка мебельная из полимерных материалов (ПВХ/АБС-пластик/ПП) серии RAUKANTEX Kantenband, производства «Rehau AG+CO», Германия
	Двери	Стекло листовое бесцветное, марки М0, М1, М4 толщиной 4,0 мм по ГОСТ 111, производства АО «Каспийский завод листового стекла», Россия
	Ручки	Нержавеющая сталь марки 08Х18Н10 (ГОСТ 5632) производства: ООО «Боярд», Россия
– Шкаф медицинский антресоль (Арт. ШН-005)	Стенки, двери, полка	Плиты древесно-стружечные, облицованные пленками на основе термореактивных полимеров, группы качества А, Б, класс по выделению формальдегида Е1. ГОСТ 32289, производитель ООО «Томлесдрев», Россия или Плиты древесно-стружечные, облицованные пленками на основе термореактивных полимеров торговой марки Eurodekor, класс эмиссии формальдегида Е1 по ГОСТ 32289, производитель ООО «ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ ШУЯ», Россия Кромка мебельная из полимерных материалов (ПВХ/АБС-пластик/ПП) серии RAUKANTEX Kantenband, производства «Rehau AG+CO», Германия
	Ручки	Нержавеющая сталь марки 08Х18Н10 (ГОСТ 5632) производства: ООО «Боярд», Россия
– Шкаф медицинский открытый (Арт. ШС-001)	Каркас	Профиль прессованный из алюминиевых сплавов марок: АД31(состояние материала Т1, Т5), А1МgО, 7Si 6063 (состояние материала Т5, Т6, Т66) анодированный, производитель ООО «Донской Алюминий», Россия

ООО «ВИТА» 690105, Приморский край, город Владивосток, Бородинская улица, дом 46/50, офис 206 Тел.: 8 423 279-59-49; e-mail: vita@vita-vdk.ru	Документ: ПТИС.324259.001 И
	Версия: 1.3
	Страница: 42 из 67

Наименование изделия	Наименование составных частей	Наименование, марка, изготовитель материала
– Шкаф медицинский открытый двухсекционный (Арт. ШС-002)	Стенки, полки	Плиты древесно-стружечные, облицованные пленками на основе термореактивных полимеров, группы качества А, Б, класс по выделению формальдегида Е1. ГОСТ 32289, производитель ООО «Томлесдрев», Россия или Плиты древесно-стружечные, облицованные пленками на основе термореактивных полимеров торговой марки Eurodekor, класс эмиссии формальдегида Е1 по ГОСТ 32289, производитель ООО «ЭГТЕР ДРЕВПРОДУКТ ШУЯ», Россия Кромка мебельная из полимерных материалов (ПВХ/АБС-пластик/ПП) серии RAUKANTEX Kantenband, производства «Rehau AG+CO», Германия
	Опоры	Профиль прессованный из алюминиевых сплавов марок: АД31(состояние материала Т1, Т5), AlMgO, 7Si 6063 (состояние материала Т5, Т6, Т66) анодированный, производитель ООО «Донской Алюминий», Россия

2.3 Требования к надежности

2.3.1 Средняя наработка на отказ (То) 20000 часов. Критериями отказа является несоответствие требованиям п. п. 2.1.5 - 2.1.13, 2.1.16 – 2.1.20.

2.3.2 Средний срок службы шкафа 4 года. Критерием предельного состояния шкафа считается невозможность или нецелесообразность его восстановления (или использования).

2.4 Комплектность

2.4.1 Комплект поставки включает в себя:

- Шкаф одного из исполнений, в сборе – 1 шт;
- Эксплуатационная документация:
Инструкция по применению – 1 шт.

Примечание: количество и исполнение шкафа определяются при заказе по согласованию с заказчиком.

ООО «ВИТА» 690105, Приморский край, город Владивосток, Бородинская улица, дом 46/50, офис 206 Тел.: 8 423 279-59-49; e-mail: vita@vita-vdk.ru	Документ: ПТИС.324259.001 И
	Версия: 1.3
	Страница: 43 из 67

2.5 Маркировка

2.5.1 Маркировка шкафа соответствует ГОСТ 16371, ГОСТ Р 50444 и ГОСТ Р ИСО 15223-1.

2.5.2 На каждом изделии прикреплена этикетка, на которой указано:

- наименование и местонахождение предприятия-изготовителя ;
- наименование изделия, его исполнение;
- обозначение изделия (артикул);
- наименование страны-изготовителя;
- дата изготовления: месяц и год ;
- гарантийный срок эксплуатации;
- срок службы;
- заводской номер ;
- обозначение технических условий, ГОСТ 16371.

ООО «ВИТА»	
 Юридический адрес: 690105, Приморский край, город Владивосток, Бородинская улица, дом 46/50, офис 206	ГОСТ 16371-2014 ТУ 32.50.30-001-48837523-2019 Изготовлено в Российской Федерации
Шкаф медицинский (Артикул) по ТУ 32.50.30-001-48837523-2019	
Дата изготовления:  .20	Порядок применения, гарантия изготовителя: см. Инструкцию по применению ПТИС.324259.001 И
Заводской номер:  XXXXXX	
Гарантийный срок эксплуатации: 24 месяца	
Срок службы: 4 года	
Транспортировать при температуре от минус 50 до плюс 50 °С и относительной влажности до 100%. Хранить в крытых помещениях при температуре не ниже плюс 2 °С и относительной влажности воздуха от 45% до 70%.	

Рисунок 29 – Шаблон маркировки шкафа

2.5.3 Транспортная маркировка по ГОСТ 14192.

Транспортная маркировка нанесена на бумажные или картонные ярлыки, или непосредственно на тару, ярлыки прикрепляют к упаковке клеем или другими материалами, обеспечивающими сохранность груза и маркировки.

На каждую транспортную тару нанесены манипуляционные знаки, соответствующие значениям:

«Хрупкое. Осторожно» 

«Беречь от влаги» 

«Верх» 

Допускаются иные информационные знаки и надписи.

ООО «ВИТА» 690105, Приморский край, город Владивосток, Бородинская улица, дом 46/50, офис 206 Тел.: 8 423 279-59-49; e-mail: vita@vita-vdk.ru	Документ: ПТИС.324259.001 И
	Версия: 1.3
	Страница: 44 из 67

2.6 Упаковка

2.6.1 Упаковка соответствует требованиям ГОСТ Р 50444, ГОСТ 16371 и конструкторской документации.

2.6.2 Эксплуатационная документация помещена в пакет из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354 и уложена в упаковку.

2.6.3 Допускаются иные способы упаковки, обеспечивающие защиту шкафа от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения, а также наиболее полное использование вместимости транспортных средств и удобство выполнения разгрузочно-погрузочных работ.

ООО «ВИТА» 690105, Приморский край, город Владивосток, Бородинская улица, дом 46/50, офис 206 Тел.: 8 423 279-59-49; e-mail: vita@vita-vdk.ru	Документ: ПТИС.324259.001 И
	Версия: 1.3
	Страница: 45 из 67

3 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

3.1 По санитарно-химическим, токсикологическим и биологическим показателям шкаф соответствует требованиям ГОСТ Р 52770, стандартов серии ГОСТ ISO 10993, а также нормативных документов, утвержденных в установленном порядке.

3.2 Уровни летучих химических веществ, выделяющихся при эксплуатации шкафа в воздух помещений, соответствуют ГОСТ 16371, и не превышают допустимый уровень, а именно: аммиака – не более 0,04 мг/м³; спирта метилового – не более 0,5 мг/м³; формальдегида – не более 0,01 мг/м³; фенола – 0,003 мг/м³. Класс эмиссии формальдегида древесно-стружечных плит – E1.

ООО «ВИТА» 690105, Приморский край, город Владивосток, Бородинская улица, дом 46/50, офис 206 Тел.: 8 423 279-59-49; e-mail: vita@vita-vdk.ru	Документ: ПТИС.324259.001 И
	Версия: 1.3
	Страница: 46 из 67

4 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

4.1 Эксплуатационные ограничения

 Каждое изделие проходит перед продажей специальную проверку изготовителем. Тем не менее, при транспортировке могут произойти непредвиденные повреждения, не связанные с производством шкафа.

Пожалуйста, проведите визуальную оценку упаковки, состояния комплектующих шкафа, чтобы убедиться в отсутствии различных вмятин, сколов, порезов и повреждений от ударов. Если Вы обнаружите повреждения, обратитесь к Изготовителю.

Рабочие условия окружающей среды:

Температура от плюс 10 до плюс 35 °С.

Относительная влажность воздуха: до 80 %.

 При работе со стеклянными дверями шкафа не допускается:

- взаимное касание изделий и касание их о твердые предметы;
- длительное присутствие влаги на поверхности стекла;
- удары жесткими предметами.

4.2 Подготовка к эксплуатации

При использовании изделия впервые после его приобретения проверьте соответствие комплектности по разделу 2.4 настоящей инструкции по применению.

Использование изделия не требует специального обучения и может быть выполнено силами пользователя.

Освободите шкаф от упаковки, выбросьте упаковочный материал.

После установки изделия в соответствии с требованиями п. п. 4.2.1 и 4.2.2, согласно варианта исполнения, шкаф готов к эксплуатации.

4.2.1 Установка шкафа

Установите шкаф на ровной гладкой поверхности, при необходимости, отрегулируйте опоры шкафа по высоте. Шкаф должен стоять ровно и устойчиво.

4.2.2 Установка навесного шкафа

 Монтаж навесного шкафа должен осуществляться только к капитальным перекрытиям зданий без дефектов (трещины, отсыревание и промерзание и др.) в соответствии с СП 158.13330.2014 и СНиП 3.03.01.

Навесной шкаф на задней стенке имеет отверстия, предназначенные для крепления. На рисунке 30 приведена схема расположения отверстий и рекомендации по креплению шкафа к стене. Шкаф должен быть закреплен прочно, неподвижно, плотно прилегая к стене задней стенкой без образования зазоров.

ООО «ВИТА» 690105, Приморский край, город Владивосток, Бородинская улица, дом 46/50, офис 206 Тел.: 8 423 279-59-49; e-mail: vita@vita-vdk.ru	Документ: ПТИС.324259.001 И
	Версия: 1.3
	Страница: 47 из 67

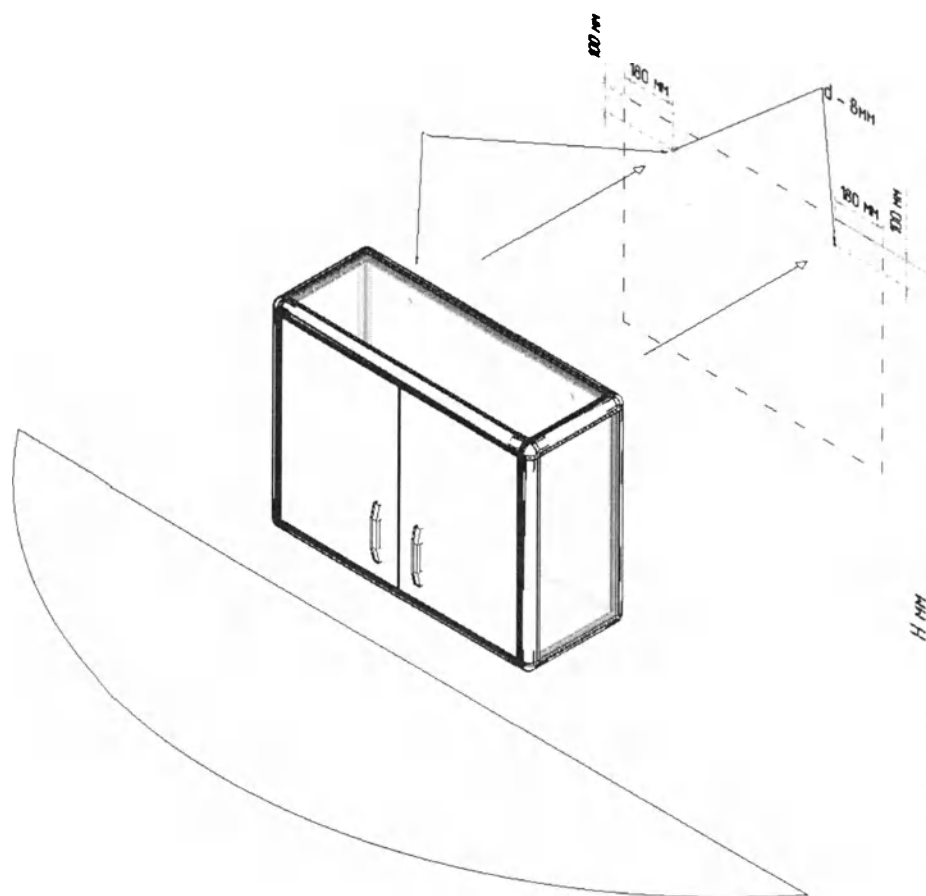


Рисунок 30 – Схема крепления шкафа навесного

Крепеж не входит в комплект поставки и выбирается в зависимости от материала стены в соответствии с рисунком 31.

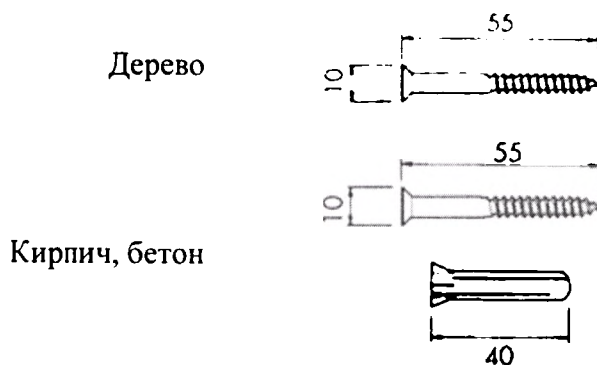


Рисунок 31 – Выбор крепления навесного шкафа

ООО «ВИТА» 690105, Приморский край, город Владивосток, Бородинская улица, дом 46/50, офис 206 Тел.: 8 423 279-59-49; e-mail: vita@vita-vdk.ru	Документ: ПТИС.324259.001 И
	Версия: 1.3
	Страница: 48 из 67

Для надежного крепления шкафа к стене необходимо следовать указаниям рисунка 32:

- 1) просверлите отверстие в стене в соответствии с разметкой отверстий для крепления шкафа;
- 2) прочистите просверленное отверстие от рабочего мусора;
- 3) вставьте в отверстие вставной шип;
- 4) закрепите шкаф на стене при помощи самонарезающего шурупа (самореза).

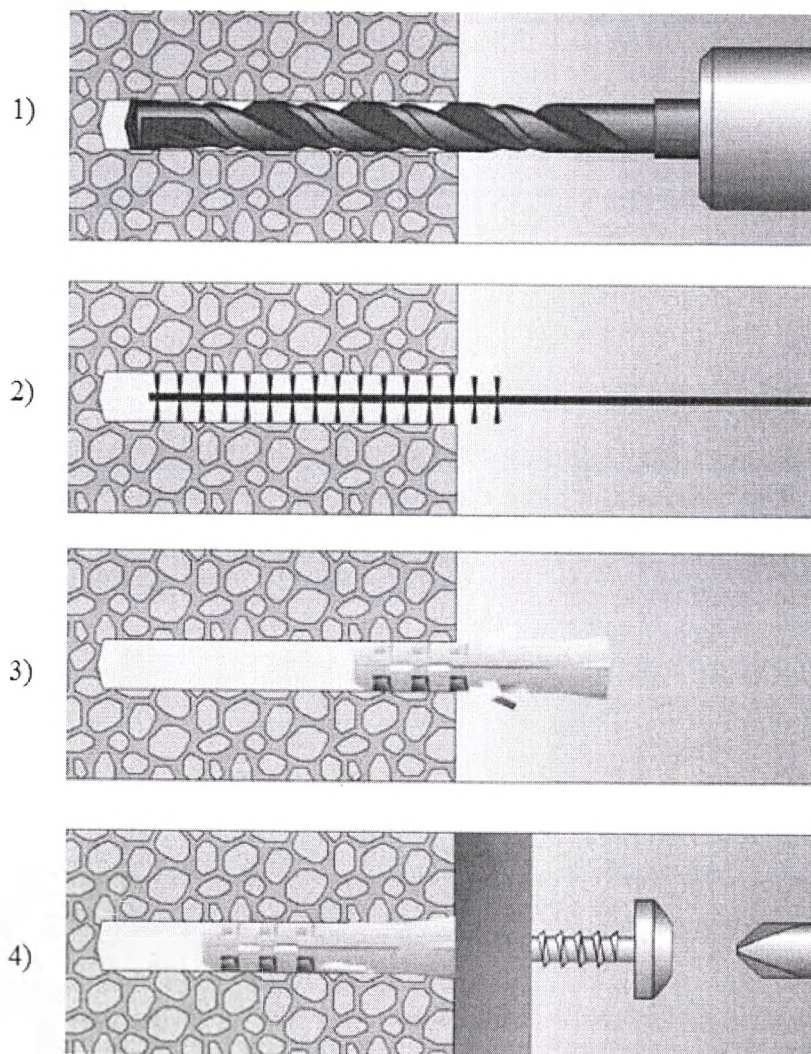


Рисунок 32 – Процесс крепления шкафа к стене

4.3 Порядок работы с изделием

 Перед первым использованием рекомендуется осуществить дезинфекцию в соответствии с требованиями раздела 5.

Используйте шкаф в соответствии с его функциональным назначением.

Примечание: Следует учитывать информацию по рекомендуемой нагрузке (п.п. 2.1.10, 2.1.13, 2.1.23).

ООО «ВИТА» 690105, Приморский край, город Владивосток, Бородинская улица, дом 46/50, офис 206 Тел.: 8 423 279-59-49; e-mail: vita@vita-vdk.ru	Документ: ПТИС.324259.001 И
	Версия: 1.3
	Страница: 49 из 67

5 УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ

5.1 Техническое обслуживание

При эксплуатации шкаф не требуют технического обслуживания. Тем не менее, необходимо регулярно контролировать отсутствие механических повреждений частей шкафа при внешнем осмотре.

Так же необходимо обеспечивать очистку и дезинфекцию шкафа.

5.2 Уход и дезинфекция

Ежедневно необходимо обеспечивать влажную уборку - 3 раза в день, из них - 2 раза с использованием моющего средства, третий раз - с применением дезинфицирующего средства.

Внешние и внутренние доступные поверхности шкафа протрите салфеткой, смоченной в дезинфицирующем растворе или моющим средством, затем протрите насухо мягкой тканью. В качестве дезинфицирующего раствора рекомендуется использовать 3 % раствор перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0.5 % моющего средства типа «Лотос» по ГОСТ 25644, 1 % раствором хлорамина по ТУ 9392-031-00203306-2003 или иными средствами согласно МУ 287-113.

 Не допускается применять соду, порошки, пасты и другие абразивные материалы, не предназначенные для ухода за шкафом.

 Не допускается протирание стеклянных дверей материалами, содержащие абразивные включения.

 Не следует ставить на поверхность шкафа и полки горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.

ООО «ВИТА» 690105, Приморский край, город Владивосток, Бородинская улица, дом 46/50, офис 206 Тел.: 8 423 279-59-49; e-mail: vita@vita-vdk.ru	Документ: ПТИС.324259.001 И
	Версия: 1.3
	Страница: 50 из 67

6 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

6.1 Использование шкафа должно осуществляться в соответствии с настоящей инструкцией по применению ПТИС.324259.001 И.

6.2 К эксплуатации шкафа допускается медицинский персонал и пациенты, детально изучившие инструкцию по применению.

ООО «ВИТА» 690105, Приморский край, город Владивосток, Бородинская улица, дом 46/50, офис 206 Тел.: 8 423 279-59-49; e-mail: vita@vita-vdk.ru	Документ: ПТИС.324259.001 И
	Версия: 1.3
	Страница: 51 из 67

7 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

7.1 Транспортирование шкафа должно проводиться в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444.

Транспортирование шкафа может осуществляться железнодорожным, автомобильным, речным и воздушным видами транспорта в крытых транспортных средствах.

Крепление транспортной упаковки в транспортных средствах и перевозка продукции на них должны проводиться согласно правилам, действующим на соответствующих видах транспорта.

При транспортировании самолетом – в отапливаемом герметизированном отсеке.

7.2 Условия транспортирования шкафа должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150: при температуре окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 °С и относительной влажности до 100% при температуре плюс 25 °С.

7.3 Условия хранения шкафа должны соответствовать условиям хранения по ГОСТ 16371: в крытых помещениях отправителя (получателя) при температуре не ниже плюс 2 °С и относительной влажности воздуха от 45% до 70%.

ООО «ВИТА» 690105, Приморский край, город Владивосток, Бородинская улица, дом 46/50, офис 206 Тел.: 8 423 279-59-49; e-mail: vita@vita-vdk.ru	Документ: ПТИС.324259.001 И
	Версия: 1.3
	Страница: 52 из 67

8 ТРЕБОВАНИЯ УТИЛИЗАЦИИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

8.1 Утилизация должна осуществляться в соответствии с правилами сбора, учёта и утилизации, установленными уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, предусмотренным СанПиН 2.1.7.2790.

8.2 Согласно СанПиН 2.1.7.2790 шкаф относится к медицинским отходам класса А – эпидемиологически безопасные отходы.

8.3 Перед утилизацией шкаф должен быть подвергнут санитарной обработке в соответствии с методическими указаниями МУ-287-113.

8.4 Шкаф должен подлежать утилизации в случае:

- окончания срока эксплуатации;
- подтверждения фактов и обстоятельств, создающих угрозу жизни и здоровью пользователя и свидетельствующих о невыполнении предусмотренного назначения.

8.5 Утилизации должна подлежать вся упаковка, в том числе и транспортная. Утилизации должны подвергаться отдельно бумага, полиэтилен и пластмасса.

ООО «ВИТА» 690105, Приморский край, город Владивосток, Бородинская улица, дом 46/50, офис 206 Тел.: 8 423 279-59-49; e-mail: vita@vita-vdk.ru	Документ: ПТИС.324259.001 И
	Версия: 1.3
	Страница: 53 из 67

9 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Шкаф медицинский производства ООО «ВИТА»

Исполнение _____

Артикул _____ Заводской номер _____

принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.

Представитель ОТК

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

(дата)

ООО «ВИТА» 690105, Приморский край, город Владивосток, Бородинская улица, дом 46/50, офис 206 Тел.: 8 423 279-59-49; e-mail: vita@vita-vdk.ru	Документ: ПТИС.324259.001 И
	Версия: 1.3
	Страница: 54 из 67

10 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Шкаф медицинский

Исполнение _____

Артикул _____ Заводской номер _____

упакован на предприятии-изготовителе ООО «ВИТА» согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

Упаковывание произвел _____

(личная подпись) (расшифровка подписи) (дата)

ООО «ВИТА» 690105, Приморский край, город Владивосток, Бородинская улица, дом 46/50, офис 206 Тел.: 8 423 279-59-49; e-mail: vita@vita-vdk.ru	Документ: ПТИС.324259.001 И
	Версия: 1.3
	Страница: 55 из 67

11 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Претензии в адрес изготовителя представляют при несоответствии поставляемого изделия, его тары, упаковки, маркировки и комплектности требованиям сопроводительной документации.

Все предъявленные рекламации должны регистрироваться заводом-изготовителем и содержать сведения о принятых мерах.

Рекламация, полученная изготовителем, рассматривается в десятидневный срок.

О принятых мерах письменно сообщается потребителю.

Для определения причин повреждений необходимо составить акт, в котором должны быть указаны:

- наименование, артикул и заводской номер изделия;
- дата получения изделия с завода-изготовителя и номер документа, по которому оно получено;
- детальное описание повреждения;
- предполагаемая причина повреждения;
- наименование поврежденных частей и т.д.

Предприятие-изготовитель принимает рекламацию, если не установлена вина получателя в возникновении дефекта в изделии.

ООО «ВИТА» 690105, Приморский край, город Владивосток, Бородинская улица, дом 46/50, офис 206 Тел.: 8 423 279-59-49; e-mail: vita@vita-vdk.ru	Документ: ПТИС.324259.001 И
	Версия: 1.3
	Страница: 56 из 67

12 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

12.1 Изготовитель гарантирует соответствие качества шкафа требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий и правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

12.2 Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня продажи предприятием-изготовителем.

12.3 Гарантийный срок хранения – 6 месяцев со дня изготовления.

Уважаемые покупатели!

При покупке убедитесь в том, что продавец полностью заполнил гарантийный талон и поставил печать.

Сохраняйте гарантийный талон в течение всего гарантийного срока.

В случае, если изделие не соответствует требованиям технических условий в гарантийный период, обратитесь к продавцу.

Гарантийный срок эксплуатации изделия указан в настоящей инструкции и исчисляется с даты продажи. При обнаружении несоответствия изделия требованиям технических условий покупателю гарантируется бесплатный ремонт или обмен на аналогичный товар надлежащего качества.

Производитель оставляет за собой право отказа по гарантийному обязательству в случае несоблюдения изложенных ниже условий гарантии:

- Гарантия действует только при правильном и четком заполнении гарантийного талона с указанием, даты продажи, четкой печатью фирмы-продавца.

Изделие снимается с гарантийного обслуживания в случаях:

- если гарантийный талон не предоставлен или информация в нем не полная, неразборчивая или содержит исправления;
- несовпадения заводского номера изделия с гарантийным талоном;
- наличия механических повреждений;
- несоблюдения правил эксплуатации изделия и т.д.

ООО «ВИТА» 690105, Приморский край, город Владивосток, Бородинская улица, дом 46/50, офис 206 Тел.: 8 423 279-59-49; e-mail: vita@vita-vdk.ru	Документ: ПТИС.324259.001 И
	Версия: 1.3
	Страница: 57 из 67

ФОРМА ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА
на замену в течение гарантийного срока

Шкаф медицинский производства ООО «ВИТА»

Исполнение _____

Артикул _____ Заводской номер _____

Приобретен _____

(дата, подпись и штамп покупателя)

Продавец _____

(подпись, печать)

ООО «ВИТА» 690105, Приморский край, город Владивосток, Бородинская улица, дом 46/50, офис 206 Тел.: 8 423 279-59-49; e-mail: vita@vita-vdk.ru	Документ: ПТИС.324259.001 И
	Версия: 1.3
	Страница: 58 из 67

ПРИЛОЖЕНИЕ А.
ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение документа, на который дана ссылка	Наименование документа
-	Приказ министерства здравоохранения Российской Федерации № 4н от 06.06.2012 «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий»
ГОСТ 2.106-96	Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Текстовые документы
ГОСТ 2.601-2013	Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы
ГОСТ 2.610-2006	Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Правила выполнения эксплуатационных документов
ГОСТ 9.032-74	ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения.
ГОСТ 9.301-86	ЕСЗКС. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования.
ГОСТ 9.303-84	Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования к выбору
ГОСТ 111-2014	Стекло листовое бесцветное. Технические условия
ГОСТ 177-88	Водорода перекись. Технические условия.
ГОСТ 5632-2014	Нержавеющие стали и сплавы коррозионно-стойкие, жаростойкие и жаропрочные. Марки
ГОСТ 10354-82	Пленка полиэтиленовая. Технические условия
ГОСТ 14192-96	Маркировка грузов
ГОСТ 15150-69	Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды
ГОСТ 16371-2014	Мебель. Общие технические условия
ГОСТ 20400-2013	Продукция мебельного производства. Термины и определения
ГОСТ 24297-2013	Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля
ГОСТ 25644-96	Средства моющие синтетические порошкообразные. Общие технические требования
ГОСТ 32289-2013	Плиты древесно-стружечные, облицованные пленками на основе термореактивных полимеров. Технические условия
ГОСТ Р 50444-92	Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия
ГОСТ Р 52770-2016	Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний
ГОСТ Р ИСО 15223-1-2014	Символы, применяемые при маркировании на медицинских изделиях, этикетках и в сопроводительной документации
МУ 287-113-98	Методические указания по дезинфекции, стерилизации изделий медицинского назначения

ООО «ВИТА» 690105, Приморский край, город Владивосток, Бородинская улица, дом 46/50, офис 206 Тел.: 8 423 279-59-49; e-mail: vita@vita-vdk.ru	Документ: ПТИС.324259.001 И
	Версия: 1.3
	Страница: 59 из 67

Обозначение документа, на который дана ссылка	Наименование документа
СанПиН 2.1.7.2790-10	Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами
серия ГОСТ ISO 10993-2011	Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий
СНиП 3.03.01-87	Несущие и ограждающие конструкции
СП 158.13330.2014	Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования
ТУ 9392-031-00203306-2003	Средство дезинфицирующее «Хлорамин Б»

ООО «ВИТА» 690105, Приморский край, город Владивосток, Бородинская улица, дом 46/50, офис 206 Тел.: 8 423 279-59-49; e-mail: vita@vita-vdk.ru	Документ: ПТИС.324259.001 И
	Версия: 1.3
	Страница: 60 из 67

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

№	Наименование изделия	Где используется. Специальные медицинские помещения	Назначение	Размещаемые мед. изделия
1.	Шкаф медицинский двухстворчатый (Арт. Ш-001)	Манипуляционные, процедурные и перевязочные кабинеты, стерилизационные, палаты интенсивной терапии, лабораторные клиничко-диагностические и бактериологические помещения	для хранения перевязочного материала, медицинской посуды, медицинских инструментов	перевязочный материал, медицинская посуда, медицинские инструменты
2.	Шкаф медицинский с четырьмя дверями двухсекционный (Арт. Ш-002)	Манипуляционные, процедурные и перевязочные кабинеты, стерилизационные, палаты интенсивной терапии, лабораторные клиничко-диагностические и бактериологические помещения	для хранения перевязочного материала, медицинской посуды, медицинских инструментов	перевязочный материал, медицинская посуда, медицинские инструменты
3.	Шкаф медицинский одностворчатый (Арт. Ш-003)	Манипуляционные, процедурные и перевязочные кабинеты, стерилизационные, палаты интенсивной терапии, лабораторные клиничко-диагностические и бактериологические помещения	для хранения перевязочного материала, медицинской посуды, медицинских инструментов	перевязочный материал, медицинская посуда, медицинские инструменты
4.	Шкаф медицинский с двумя дверями двухсекционный (Арт. Ш-004)	Манипуляционные, процедурные и перевязочные кабинеты, стерилизационные, палаты интенсивной терапии,	для хранения перевязочного материала, медицинской посуды, медицинских инструментов	перевязочный материал, медицинская посуда, медицинские инструменты

ООО «ВИТА» 690105, Приморский край, город Владивосток, Бородинская улица, дом 46/50, офис 206 Тел.: 8 423 279-59-49; e-mail: vita@vita-vdk.ru	Документ: ПТИС.324259.001 И
	Версия: 1.3
	Страница: 61 из 67

		лабораторные клинико- диагностические и бактериологические помещения		
5.	Шкаф медицинский комбинированный двухсекционный с четырьмя дверями (Арт. Ш-005)	Манипуляционные, процедурные и перевязочные кабинеты, стерилизационные, палаты интенсивной терапии, лабораторные клинико- диагностические и бактериологические помещения	для хранения перевязочного материала, медицинской посуды, медицинских инструментов	перевязочный материал, медицинская посуда, медицинские инструменты
6.	Шкаф медицинский комбинированный двухсекционный с двумя дверями (Арт. Ш-006)	Манипуляционные, процедурные и перевязочные кабинеты, стерилизационные, палаты интенсивной терапии, лабораторные клинико- диагностические и бактериологические помещения	для хранения перевязочного материала, медицинской посуды, медицинских инструментов	перевязочный материал, медицинская посуда, медицинские инструменты
7.	Шкаф медицинский с четырьмя выдвижными ящиками двухсекционный (Арт. Ш-007)	Манипуляционные, процедурные и перевязочные кабинеты, стерилизационные, палаты интенсивной терапии, лабораторные клинико- диагностические и бактериологические помещения	для хранения перевязочного материала, медицинской посуды, медицинских инструментов	перевязочный материал, медицинская посуда, медицинские инструменты
8.	Шкаф медицинский для одежды (Арт. Ш-008)	Манипуляционные, процедурные и перевязочные кабинеты, стерилизационные, палаты интенсивной терапии, лабораторные клинико-	для хранения перевязочного материала, медицинской посуды, медицинских инструментов	перевязочный материал, медицинская посуда, медицинские инструменты

ООО «ВИТА» 690105, Приморский край, город Владивосток, Бородинская улица, дом 46/50, офис 206 Тел.: 8 423 279-59-49; e-mail: vita@vita-vdk.ru	Документ: ПТИС.324259.001 И
	Версия: 1.3
	Страница: 62 из 67

		диагностические и бактериологические помещения		
9.	Шкаф медицинский для одежды малый (Арт. Ш-009)	Манипуляционные, процедурные и перевязочные кабинеты, стерилизационные, палаты интенсивной терапии, лабораторные клиничко-диагностические и бактериологические помещения	для хранения перевязочного материала, медицинской посуды, медицинских инструментов	перевязочный материал, медицинская посуда, медицинские инструменты
10.	Шкаф медицинский с двумя выдвижными ящиками двухсекционный (Арт. Ш-010)	Манипуляционные, процедурные и перевязочные кабинеты, стерилизационные, палаты интенсивной терапии, лабораторные клиничко-диагностические и бактериологические помещения	для хранения перевязочного материала, медицинской посуды, медицинских инструментов	перевязочный материал, медицинская посуда, медицинские инструменты
11.	Шкаф медицинский с восьмью выдвижными ящиками (Арт. Ш-011)	Манипуляционные, процедурные и перевязочные кабинеты, стерилизационные, палаты интенсивной терапии, лабораторные клиничко-диагностические и бактериологические помещения	для хранения перевязочного материала и медицинских инструментов	перевязочный материал, медицинские инструменты
12.	Шкаф медицинский с восьмью выдвижными ящиками односекционный (Арт. Ш-012)	Манипуляционные, процедурные и перевязочные кабинеты, стерилизационные, палаты интенсивной терапии, лабораторные клиничко-диагностические и	для хранения перевязочного материала и медицинских инструментов	перевязочный материал, медицинские инструменты

ООО «ВИТА» 690105, Приморский край, город Владивосток, Бородинская улица, дом 46/50, офис 206 Тел.: 8 423 279-59-49; e-mail: vita@vita-vdk.ru	Документ: ПТИС.324259.001 И
	Версия: 1.3
	Страница: 63 из 67

		бактериологические помещения		
13.	Шкаф медицинский двухстворчатый с перегородкой (Арт. Ш-013)	Манипуляционные, процедурные и перевязочные кабинеты, стерилизационные, палаты интенсивной терапии, лабораторные клиничко-диагностические и бактериологические помещения	для хранения перевязочного материала, медицинской посуды, медицинских инструментов	перевязочный материал, медицинская посуда, медицинские инструменты
14.	Шкаф медицинский с четырьмя дверями (Арт. Ш-014)	Манипуляционные, процедурные и перевязочные кабинеты, стерилизационные, палаты интенсивной терапии, лабораторные клиничко-диагностические и бактериологические помещения	для хранения перевязочного материала, медицинской посуды, медицинских инструментов	перевязочный материал, медицинская посуда, медицинские инструменты
15.	Шкаф медицинский комбинированный с четырьмя дверями (Арт. Ш-015)	Манипуляционные, процедурные и перевязочные кабинеты, стерилизационные, палаты интенсивной терапии, лабораторные клиничко-диагностические и бактериологические помещения	для хранения перевязочного материала, медицинской посуды, медицинских инструментов	перевязочный материал, медицинская посуда, медицинские инструменты
16.	Шкаф медицинский с четырьмя выдвижными ящиками (Арт. Ш-016)	Манипуляционные, процедурные и перевязочные кабинеты, стерилизационные, палаты интенсивной терапии, лабораторные клиничко-диагностические и бактериологические помещения	для хранения перевязочного материала, медицинской посуды, медицинских инструментов	перевязочный материал, медицинская посуда, медицинские инструменты

ООО «ВИТА» 690105, Приморский край, город Владивосток, Бородинская улица, дом 46/50, офис 206 Тел.: 8 423 279-59-49; e-mail: vita@vita-vdk.ru	Документ: ПТИС.324259.001 И
	Версия: 1.3
	Страница: 64 из 67

17.	Шкаф медицинский для одежды двухстворчатый (Арт. Ш-017)	Манипуляционные, процедурные и перевязочные кабинеты, стерилизационные, палаты интенсивной терапии, лабораторные клиничко-диагностические и бактериологические помещения	для хранения перевязочного материала, медицинской посуды, медицинских инструментов	перевязочный материал, медицинская посуда, медицинские инструменты
18.	Шкаф медицинский для одежды одностворчатый (Арт. Ш-018)	Манипуляционные, процедурные и перевязочные кабинеты, стерилизационные, палаты интенсивной терапии, лабораторные клиничко-диагностические и бактериологические помещения	для хранения перевязочного материала, медицинской посуды, медицинских инструментов	перевязочный материал, медицинская посуда, медицинские инструменты
19.	Шкаф медицинский с восьмью выдвижными ящиками двухсекционный (Арт. Ш-019)	Манипуляционные, процедурные и перевязочные кабинеты, стерилизационные, палаты интенсивной терапии, лабораторные клиничко-диагностические и бактериологические помещения	для хранения перевязочного материала, медицинской посуды, медицинских инструментов	перевязочный материал, медицинская посуда, медицинские инструменты
20.	Шкаф медицинский с тремя выдвижными ящиками двухсекционный (Арт. Ш-020)	Манипуляционные, процедурные и перевязочные кабинеты, стерилизационные, палаты интенсивной терапии, лабораторные клиничко-диагностические и бактериологические помещения	для хранения перевязочного материала, медицинской посуды, медицинских инструментов	перевязочный материал, медицинская посуда, медицинские инструменты
21.	Шкаф медицинский навесной (Арт. ШН-001)	Манипуляционные, процедурные и	для хранения перевязочного	перевязочный материал,

ООО «ВИТА» 690105, Приморский край, город Владивосток, Бородинская улица, дом 46/50, офис 206 Тел.: 8 423 279-59-49; e-mail: vita@vita-vdk.ru	Документ: ПТИС.324259.001 И
	Версия: 1.3
	Страница: 65 из 67

		перевязочные кабинеты, стерилизационные, палаты интенсивной терапии, лабораторные клиничко-диагностические и бактериологические помещения	материала, медицинской посуды, медицинских инструментов	медицинская посуда, медицинские инструменты
22.	Шкаф медицинский навесной открытый (Арт. ШН-002)	Манипуляционные, процедурные и перевязочные кабинеты, стерилизационные, палаты интенсивной терапии, лабораторные клиничко-диагностические и бактериологические помещения	для хранения перевязочного материала, медицинской посуды, медицинских инструментов	перевязочный материал, медицинская посуда, медицинские инструменты
23.	Шкаф медицинский навесной угловой (Арт. ШН-003)	Манипуляционные, процедурные и перевязочные кабинеты, стерилизационные, палаты интенсивной терапии, лабораторные клиничко-диагностические и бактериологические помещения	для хранения перевязочного материала, медицинской посуды, медицинских инструментов	перевязочный материал, медицинская посуда, медицинские инструменты
24.	Шкаф медицинский антресоль (Арт. ШН-004)	Манипуляционные, процедурные и перевязочные кабинеты, стерилизационные, палаты интенсивной терапии, лабораторные клиничко-диагностические и бактериологические помещения	для хранения перевязочного материала, медицинской посуды, медицинских инструментов	перевязочный материал, медицинская посуда, медицинские инструменты
25.	Шкаф медицинский антресоль (Арт. ШН-005)	Манипуляционные, процедурные и перевязочные кабинеты,	для хранения перевязочного материала, медицинской	перевязочный материал, медицинская посуда,

ООО «ВИТА» 690105, Приморский край, город Владивосток, Бородинская улица, дом 46/50, офис 206 Тел.: 8 423 279-59-49; e-mail: vita@vita-vdk.ru	Документ: ПТИС.324259.001 И
	Версия: 1.3
	Страница: 66 из 67

		стерилизационные, палаты интенсивной терапии, лабораторные клиничко-диагностические и бактериологические помещения	посуды, медицинских инструментов	медицинские инструменты
26.	Шкаф медицинский открытый (Арт. ШС-001)	Манипуляционные, процедурные и перевязочные кабинеты, стерилизационные, палаты интенсивной терапии, лабораторные клиничко-диагностические и бактериологические помещения	для хранения перевязочного материала, медицинской посуды, медицинских инструментов	перевязочный материал, медицинская посуда, медицинские инструменты
27.	Шкаф медицинский открытый двухсекционный (Арт. ШС-002)	Манипуляционные, процедурные и перевязочные кабинеты, стерилизационные, палаты интенсивной терапии, лабораторные клиничко-диагностические и бактериологические помещения	для хранения перевязочного материала, медицинской посуды, медицинских инструментов	перевязочный материал, медицинская посуда, медицинские инструменты

Лист регистрации изменений

[illegible]

г. Владивосток

прошито, пронумеровано, скреплено
печатью 67 лист(ов)

Генеральный директор
ООО «Вита»

Чайус Н.Н.
«31» мая 2023

