


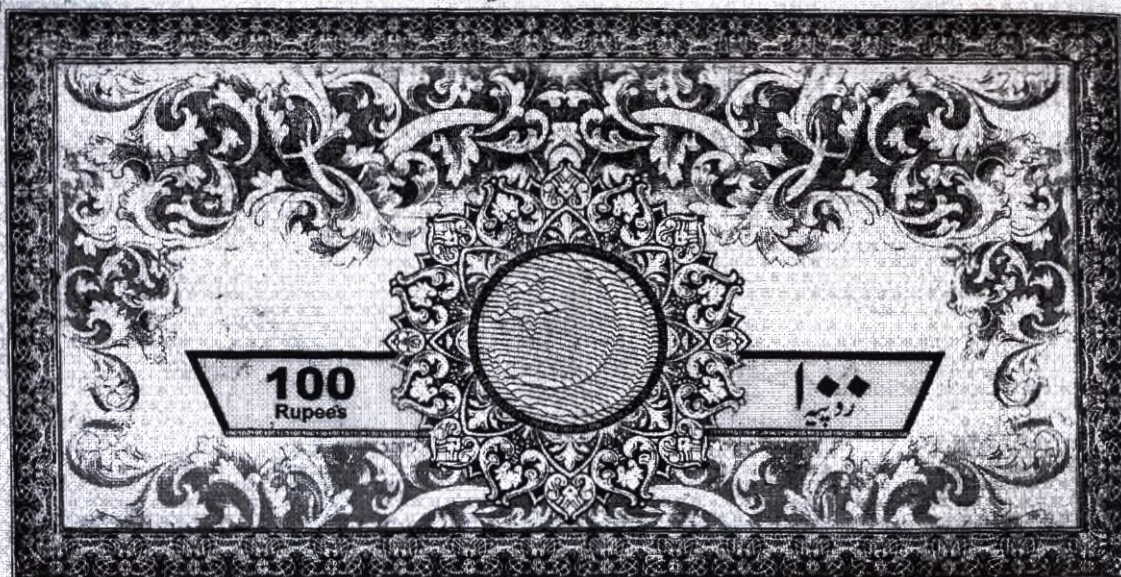

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


APOSTILLE



1. Country: Islamic Republic of Pakistan
This public Document
2. has been signed by Zaheer Haider Awan
3. acting in the capacity of NOTARY PUBLIC GOVT OF PAKISTAN.
4. Bears the seal/stamp of ZAHEER HAIDER AWAN (ADVOCATE HIGH COURT)
NOTARY PUBLIC
SIALKOT PAKISTAN

CERTIFIED

5. at SIALKOT PAKISTAN
6. the 13 July 2022
7. by ADVOCATE HIGH COURT NOTARY PUBLIC OF PAKISTAN
8. No. C.C. 6845
9. Seal/Stamp:

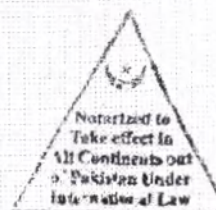

ATTESTED



SURGIWELL
NEAR POLY TECHNICAL STAFF
COLONY DEFENCE ROAD SIALKOT
PAKISTAN.

86
13-07-202


AFFIDUIT
C/O M. SALMAN



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
AHMED
Stamp Vendor
Kutcher

ATTESTED

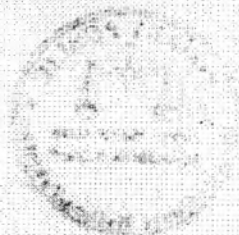

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

SURGIWELL (PVT) LTD

(СУРДЖИВЕЛЛ (ПВТ) ЛТД)


SURGIWELL®

SURGICAL INSTRUMENTS

Defence Road, 51310 - Sialkot Pakistan

Мухаммад Аднан Юсаф

/Muhammad Adnan Yousaf/

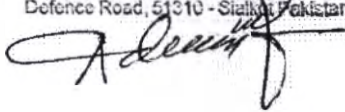

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ИНСТРУМЕНТЫ МЕДИЦИНСКИЕ ХИРУРГИЧЕСКИЕ

В ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ:

ИГЛОДЕРЖАТЕЛИ.

Наименование медицинского изделия:

Инструменты медицинские хирургические в вариантах исполнения: Иглодержатели.
(Варианты исполнения представлены в Таблице 1.)

Производитель:

SURGIWELL (PVT) LTD

СУРДЖИВЕЛЛ (ПВТ) ЛТД

Pakistan, 51310, Sialkot, Near Polytech Staff Colony, Defence Road.

Пакистан, 51310, Сялкот, Ннар Политех Стафф Колони, Дефенс Роуд.

Уполномоченный представитель в России:

ООО МК «Мед-Континент», 60116, г. Нижний Новгород, ул. М.Казакова, д.3, помещ. П4, офис 7.

Телефон/факс: (831) 275-15-17

E-mail: info@med-continent.ru

Описание, назначение, функциональные характеристики:

Инструменты медицинские хирургические многоразового применения 1 класса риска.

Вид медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией – 209300.

Хирургический инструмент, предназначенный для захвата хирургической иглы во время проталкивания/вытягивания иглы и прикрепленного шовного материала через ткань во время наложения швов. Он имеет короткие зазубренные бранши на дистальном конце для улучшения захвата иглы. Доступны изделия в широком разнообразии размеров и конструкций, таких как: 1) самофиксирующаяся конструкция в виде ножниц с кольцевыми ручками на проксимальном конце; 2) в виде пинцета с изогнутыми, шарнирно закрепленными рукоятками, которыми управляют, сжимая их вместе; 3) мощная клещеподобная конструкция. В некоторых изделиях могут быть использованы вставки из твердосплавных материалов (например, из карбида) и лезвия ножниц.

Технические характеристики:

Материал изготовления иглодержателей, сталь марки: 1.4021- X 20 Cr 13.

Материал изготовления иглодержателей тсв (иглодержателей с твердосплавными пластинами), сталь марки: 1.4021 - X 20 Cr 13 с применением твердосплавных пластин из материала TSF 22 - WC (Карбид вольфрама или монокристалл вольфрама).

Инструменты с пластинами из твердого сплава на основе карбида вольфрама имеют ручки золотистого цвета.

Инструменты соответствуют требованиям ГОСТ 19126, ГОСТ 21238, ГОСТ ISO 13402.

Виды климатического исполнения – УХЛ4.2 и О4.2 по ГОСТ 15150.

Параметры шероховатости: - для наружной глянцевой поверхности не более 0,16 мкм;
- для наружной матовой не более 0,63 мкм.

Таблица 1.

№ №	Артикул	Наименование	№ эскиза	Масса не более (г)	Усилие свободного хода (Н)	Положение раб. частей при защелкивании за 1-й зуб	Положение раб. частей при защелкивании за последний зуб
1	23-2410R	Иглодержатель	1.11	35	2 Н	смыкание концов	смыкание по всей длине
2	23-2343R	Иглодержатель	1.12	100	2 Н	смыкание концов	смыкание по всей длине
3	23-2345R	Иглодержатель	1.13	125	2 Н	смыкание концов	смыкание по всей длине
4	22-2192R	Иглодержатель тсв	1.14	45	2 Н	смыкание концов	смыкание по всей длине
5	22-2200	Иглодержатель тсв	1.14	55	2 Н	смыкание концов	смыкание по всей длине
6	22-2201	Иглодержатель тсв	1.14	60	2 Н	смыкание концов	смыкание по всей длине
7	22-2202	Иглодержатель тсв	1.14	80	2 Н	смыкание концов	смыкание по всей длине
8	22-2203	Иглодержатель тсв	1.14	100	2 Н	смыкание концов	смыкание по всей длине
9	22-2206R	Иглодержатель тсв	1.14	120	2 Н	смыкание концов	смыкание по всей длине
10	22-2205	Иглодержатель тсв	1.14	160	2 Н	смыкание концов	смыкание по всей длине
№ №	Артикул	Наименование	№ эскиза	Масса не более (г)	Усилие свободного хода	Положение раб. частей при	Положение раб. частей при защелкивании за последний зуб

					хода (Н)	зацеплении за 1-й зуб	
11	22-2114R	Иглодержатель тсв	1.15	60	2 Н	смыкание концов	смыкание по всей длине
12	22-2115	Иглодержатель тсв	1.15	75	2 Н	смыкание концов	смыкание по всей длине
13	23-2310R	Иглодержатель	1.16	35	2 Н	смыкание концов	смыкание по всей длине
14	23-2352	Иглодержатель	1.16	80	2 Н	смыкание концов	смыкание по всей длине
15	23-2353R	Иглодержатель	1.16	120	2 Н	смыкание концов	смыкание по всей длине
16	22-2223	Иглодержатель тсв	1.17	85	2 Н	смыкание концов	смыкание по всей длине
17	23-2405	Иглодержатель	1.18	35	2 Н	смыкание концов	смыкание по всей длине
18	23-2405R	Иглодержатель	1.19	35	2 Н	смыкание концов	смыкание по всей длине
19	23-2331R	Иглодержатель	1.20	60	2 Н	смыкание концов	смыкание по всей длине
20	23-2333R	Иглодержатель	1.20	120	2 Н	смыкание концов	смыкание по всей длине
21	23-2335R	Иглодержатель	1.20	160	2 Н	смыкание концов	смыкание по всей длине
22	22-2200R	Иглодержатель	1.21	60	2 Н	смыкание концов	смыкание по всей длине
23	23-2357NR	Иглодержатель-ножницы	1.22	60	2 Н	смыкание концов	смыкание по всей длине

Инструменты медицинские хирургические не требуют установки, монтажа, настройки и иных действий для ввода в эксплуатацию.

Инструменты медицинские хирургические поставляются нестерильными.

Изделия после расконсервации должны быть подвергнуты дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации.

Указания и инструкции по эксплуатации, повторной обработке, предстерилизационной очистке и стерилизации:

ВНИМАНИЕ	1. Новые медицинские инструменты перед первым применением должны пройти все этапы обработки (дезинфекцию, предстерилизационную очистку, стерилизацию) аналогично инструментам бывшим в употреблении.
Ограничения при проведении повторной обработки	1. Внутренние части инструментов требуют особого внимания во время очистки. 2. Гарантийный срок службы инструментов - 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию. 3. Если медицинский инструмент использовался при лечении пациента с диагнозом или с подозрением на болезнь Крейтцфельда-Якоба, повторное использование такого инструмента запрещено, он должен быть уничтожен из-за невозможности его повторной обработки или стерилизации во избежание риска перекрестного заражения. 4. Во всех случаях, когда в операционных используются средства и препараты с содержанием веществ вызывающих коррозию инструмента (такие как нитрат серебра, препараты йода, соединения содержащие ртуть и др.), остатки этих веществ должны быть удалены с поверхности инструмента немедленно.
ИНСТРУКЦИИ	
Место использования	Удалить пыль/загрязнения и т.д., используя одноразовую тканевую/бумажную салфетку.
Защита и транспортирование	Специальных требований к герметичности и транспортировке не предусмотрено.
Подготовка	Инструменты следует продезинфицировать и очистить сразу же после использования. Любое загрязнение, оставшееся до высыхания, делает очистку намного сложнее и может привести к повреждению инструментов. При необходимости инструменты должны быть раскрыты/разведены, что позволит дезинфицирующему средству воздействовать на всю поверхность. Для дезинфекции инструментов можно использовать влажную тепловую или химическую дезинфекцию. Рекомендуется влажная тепловая дезинфекция: водяной насыщенный пар под избыточным давлением 50кПа, при температуре 110°C 20+5минут. Ни в коем случае инструменты не должны храниться в физиологическом солевом растворе, поскольку длительный контакт вызывает точечную коррозию и ржавчину. Инструмент может быть поврежден в результате падения. Чтобы этого избежать, следует осторожно обрабатывать и складывать инструменты после использования.

Подготовка (продолжение)	Во избежание покрытия ржавчиной и образования коррозии, инструменты должны быть незамедлительно подвергнуты машинной обработке. В целях обработки необходимо сложить инструменты на подходящих лотках, перфорированных стерилизационных поддонах. Для эффективной очистки необходимо открыть инструменты, имеющие шарниры. Инструменты, подлежащие механической обработке, должны быть помещены в комбинированный дезинфицирующий и очищающий раствор. Следует использовать только растворы, не вызывающие коррозию, в заданных концентрациях. Инструменты никогда не должны оставаться в растворе на ночь перед очисткой, так как риск причинения серьезного повреждения увеличивается с течением времени между использованием и подготовкой. Запрещается использовать высококислотные или высокощелочные средства для дезинфекции, в частности хлоросодержащие вещества, виркон, аналиты, каталиты и растворы, содержащие перекись водорода. Необходимо выбрать средства для дезинфекции высокого уровня, например, дезинфицирующее средство из глутаральдегидов. При использовании средства, следуйте рекомендациям относительно концентрации, температуры, времени воздействия в соответствии с инструкцией производителя. При завершении процесса дезинфекции медицинский инструмент следует тщательно промыть дистиллированной водой для полного удаления дезинфицирующего раствора. Разборка не требуется.
Автоматическая/ механизованная очистка	Следует обратить внимание на следующее: - при применении дезинфицирующего моющего средства, следуйте рекомендациям производителя в соответствии с инструкцией; - должны быть открыты шарнирные инструменты, что гарантирует тщательную очистку шарнира; - не перегружайте перфорированные лотки и тщательно промывайте все инструменты; Остатки после фазы очистки, должны быть полностью удалены при последующих процедурах полоскания, поскольку в противном случае может произойти образование пятен и/или обесцвечивание. Дополнительное использование подходящего нейтрализующего раствора улучшает результаты промывки. Для окончательной промывки оптимальной считается температура 70-90°C. Следует использовать стерильную и деминерализованную воду. Оборудование: Перчатки латексные, жидкое моющее средство, моечная машина/дезинфекционный аппарат. <u>Технология выполнения работ:</u> 1. Надеть латексные перчатки. 2. Загрузить инструменты таким образом, чтобы шарниры были открыты, а отверстия канюль моечной машины могли отводить воду в корзину/подставку моечной машины/дезинфекционного аппарата. 3. Промыть инструменты под проточной водой, (рекомендованная температура от 30°C до 40°C). 4. Поместить корзину/подставку с инструментами в аппарат. 5. Запустить стандартный цикл промывки в течение 5 - 6 мин при 80°C - 85°C. 6. Промыть под горячей водой в течение 3 – 4 минут. 7. При разгрузке необходимо проверить углубления, отверстия и т.д. на предмет полного удаления видимого загрязнения и т.д. При необходимости повторите цикл или используйте ручную очистку. Высушить инструменты горячим воздухом при температуре 85°C.
Ручная очистка	Для подготовки к ручной предстерилизационной очистке инструменты должны быть помещены в комбинированный дезинфицирующий и очищающий раствор с доказанным дезинфицирующим эффектом. Необходимо строго соблюдать инструкции производителя в отношении концентрации, температуры и времени проявления индукции. Ежедневно используйте свежие дезинфицирующие и чистящие средства. При длительном использовании одного и того же раствора возрастает риск коррозии. Инструменты должны быть полностью погружены в раствор. После химической дезинфекции и очистки инструменты всегда должны хорошо промываться под проточной водой (ниже 43°C).

4

Ручная очистка (продолжение)	Любой остаток средства необходимо удалить вручную (без металлических щеток, без чистящих средств!). Во избежание появления водяных пятен рекомендуется промывка стерильной и деминерализованной водой. После этого инструменты должны быть незамедлительно высушены горячим воздухом при температуре 85°C. Оборудование: Перчатки латексные, моющее средство, неметаллическая щетка и проточная вода. Технология выполнения работ: 1. Надеть латексные перчатки. 2. Промыть инструменты в воде (рекомендованная температура от 30°C до 40°C). 3. При помощи щетки нанести моющее средство на все поверхности, при этом все узлы, губки и фиксаторы инструментов должны быть очищены в открытых и закрытых положениях. 4. Очистить зубцы и отверстия, используя подходящую щетку и обеспечивая очистку на надлежащей глубине. 5. Промыть чистой проточной водой в течение 3 - 4 минут (рекомендованная температура от 30°C до 40°C). Проточная вода должна проходить через отверстия. Несквозные отверстия должны заполняться водой и затем осушаться.
Дезинфекция	Дезинфицирующее средство высокого уровня, например, дезинфицирующее средство из глутаральдегидов (Глутарал, Глутарал-Н). При использовании средства, следуйте рекомендациям относительно концентрации, температуры, времени воздействия в соответствии с инструкцией производителя. При завершении процесса дезинфекции медицинский инструмент следует тщательно промыть дистиллированной водой для полного удаления дезинфицирующего раствора.
Сушка	Температура процесса сушки не должна превышать 85°C.
Техническое обслуживание	Отдать в утилизацию поврежденные инструменты.
Осмотр и рабочие испытания	После каждой очистки инструменты должны быть макроскопически чистыми, то есть не иметь видимого белкового и другого загрязнения. Изношенные, корродированные или поврежденные инструменты должны быть изъяты и утилизированы. Корродированные инструменты могут вызвать контактную коррозию даже на идеальном хирургическом инструменте. Пятна на хирургических инструментах могут быть вызваны неправильной подготовкой. Причинами таких пятен являются: - Недостаточная механическая или ручная очистка; - Неподходящие средства для очистки, дезинфекции и ухода; - Несоблюдение инструкций по дозировке для очистки, дезинфекции или ухода; - Остатки чистящих и дезинфицирующих средств – недостаточная промывка; - Плохое качество воды; - Остатки в стерилизационном паре, когда качество пара не соответствует рекомендациям; - Остатки лекарств, маркировки или химических индикаторов. - Процедурные ошибки, например, не проведение очистки новых инструментов перед стерилизацией. 1. Осмотрите инструменты визуально на предмет повреждений и износа; на кромках не должно быть сколов. 2. В случае навесных инструментов проверьте плавное перемещение шарнира без чрезмерного зазора. Закрытие (шарнира, при наличии) механизмов должно быть проверено на предмет работоспособности.
Упаковка перед стерелизацией	1. По отдельности: Может использоваться стандартный полиэтиленовый пакет/сумка (рулоны комбинированные, пакеты комбинированные и бумажные типа ПИК-ПАК, ВОМ, "Клинипак", «СтериТ®»). 2. В наборах: Инструменты могут быть загружены в специализированные лотки/контейнеры для инструментов или в лотки/контейнеры для стерилизации общего назначения. Оберните лотки/контейнеры с помощью хлопчатобумажной ткани. Навесные инструменты должны быть открыты.

Стерилизация паровым методом	- Давление пара в стерилизационной камере 210 кПа. - Температура стерилизации 134°C. - Время стерилизационной выдержки 5 минут.
Стерилизация горячим воздухом	- Температура 180°C в течение 60+5 мин.
Условия хранения	1. Инструменты прошедшие стерилизацию без упаковки должны быть использованы непосредственно после стерилизации. 2. Срок и условия сохранения стерильности инструмента прошедшего стерилизацию в упаковке устанавливает производитель стерилизационной упаковки. Медицинские инструменты не следует хранить вместе с химическими реагентами, т.к. последние могут разрушать металл при прямом контакте или выделять вызывающие коррозию пары.
Дополнительная информация	При стерилизации различного инструмента в одном автоклавному цикле убедитесь, что не превышена максимальная нагрузка, указанная изготовителем стерилизационной установки.

Область и условия применения, потенциальные потребители:

Инструменты медицинские хирургические применяются квалифицированными специалистами в области хирургии.

Инструменты медицинские хирургические предназначены для использования в условиях лечебных, научно-исследовательских медицинских учреждений хирургического профиля, в условиях операционных блоков, перевязочных или смотровых кабинетов, учреждений скорой медицинской помощи и предназначены для применения при производстве хирургических операций и других медицинских манипуляций медицинским персоналом высшего и среднего звена.

Инструменты должны использоваться только обученным и квалифицированным персоналом в соответствии с его назначением.

Рекомендуется применять в сухих помещениях при температуре + 10° - +45°C.

Относительная влажность воздуха не должна превышать 80 % при 25°C.

Инструменты поставляются нестерильными и перед применением должны быть очищены, дезинфицированы и стерилизованы.

Инструменты должны быть подготовлены персоналом, имеющим соответствующую квалификацию и образование и умеющим оценить возникающие риски и соответствующие воздействие.

Требования безопасности:

Инструменты соответствуют требованиям токсикологической и санитарно-химической безопасности по ГОСТ ISO 10993-1, ГОСТ ISO 10993-10, ГОСТ ISO 10993-11 и ГОСТ Р 52770.

Показания к применению:

Для захвата хирургической иглы во время проталкивания/вытягивания иглы и прикрепленного шовного материала через ткань во время наложения швов.

Противопоказания:

Использование изделий не по назначению.

Не применять при наличии трещин, переломов и других возможных повреждений.

Побочные эффекты:

Возможна аллергическая реакция на составляющие материалы и/или его компоненты.

Применение:

Инструменты должны быть подготовлены персоналом, имеющим соответствующую квалификацию, образование, и умеющим оценивать возникающие риски и соответствующее воздействие.

Изделия применяются только квалифицированным медицинским персоналом.

Использовать строго по медицинскому назначению;

Перед использованием необходимо осмотреть инструмент на предмет отсутствия возможного повреждения, износа, неработающих деталей.

Необходимо соблюдать режимы дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации.

Предупреждение:

Не допускается самостоятельное изменение конструкции потребителем;

Не допускается использование инструмента в следующих случаях:

Для всех инструментов:

- наличие механических повреждений;
- появление неустраняемой коррозии, видимой невооруженным глазом

Упаковка и комплектность поставки:

Индивидуальная упаковка - полиэтиленовый пакет. Допускается использование полиэтиленового пакета с логотипом предприятия-изготовителя.

Групповая упаковка (потребительская тара) – картонная коробка.

Количество инструментов, упакованных в потребительскую тару, зависит от размера инструмента и является кратным 5.

Инструкция по эксплуатации вкладывается в транспортную тару – 1 шт.

В качестве транспортной тары используется коробка, изготовленная из прочного картона. Вес коробки с изделиями должен быть не более 20 кг.

Транспортировка и хранение:

Условия транспортирования по ГОСТ 15150 для группы 5 (ОЖ 4).

Инструменты медицинские хирургические транспортируются всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида, при температуре от -50°C до +50°C.

После транспортирования в условиях отрицательных температур перед распаковкой инструменты должны быть выдержаны в нормальных климатических условиях.

Условия хранения по ГОСТ 15150 для группы 1 (Л): Инструменты хранятся в отапливаемых помещениях при температуре от 5 до 40°C и относительной влажности воздуха - 80% при t- 25°C.

Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

В процессе эксплуатации инструменты должны выдерживать воздействие температуры в пределах от +10°C до +45°C и влажности не более 80% при 25°C, соответствующее климатическому исполнению УХЛ или О категории размещения 4.2.

Ремонт и техническое обслуживание:

Инструменты не подлежат ремонту и техническому обслуживанию. В случае выявления неисправностей, следов коррозии и пр. инструменты в гарантийный период подлежат замене, в постгарантийный – утилизации.

Правила утилизации:

Утилизация инструментов и элементов их упаковки в медицинских организациях Российской Федерации осуществляется в соответствии с СанПиНом 2.1.3684-21.

- для неиспользованных инструментов по классу опасности А;
- для использованных инструментов по классу опасности Б.

Гарантии производителя:

Гарантийный срок службы для инструментов – 1 год со дня ввода в эксплуатацию.

Срок службы – 5 лет.

Гарантийный срок хранения инструментов - 5 лет без переконсервации.

Сведения о рекламациях и нежелательных событиях:

Рекламации предъявляются представителю производителя на территории Российской Федерации в установленном порядке с приложением этикетки.

Медицинские организации, осуществляющие деятельность в сфере обращения медицинских изделий, должны информировать представителя производителя медицинских изделий на территории Российской Федерации о нежелательных событиях, которые имеют признаки неблагоприятного события (инцидента), а также предоставлять доступ к медицинским изделиям, с которыми могут быть связаны указанные события.

Представитель производителя на территории Российской Федерации:

ООО МК «Мед-Континент», 60116, г.Нижний Новгород, ул.М.Казакова, д.3, помещ.П4, офис 7.

Телефон/факс: (831) 275-15-17

E-mail: info@med-continent.ru

Приложении 1

ЭСКИЗЫ

Габаритные и основные размеры изделий

(РАЗМЕРЫ ПРИВЕДЕНЫ В ММ)

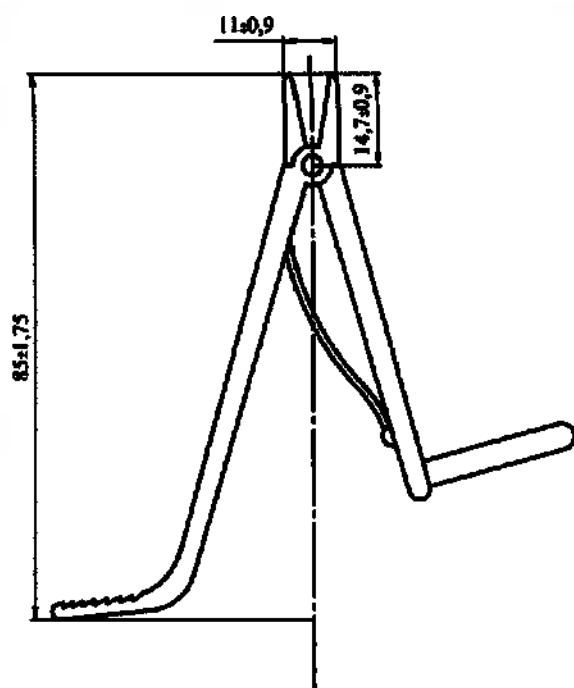


Рисунок 1.11 - 23-2410R Иглодержатель

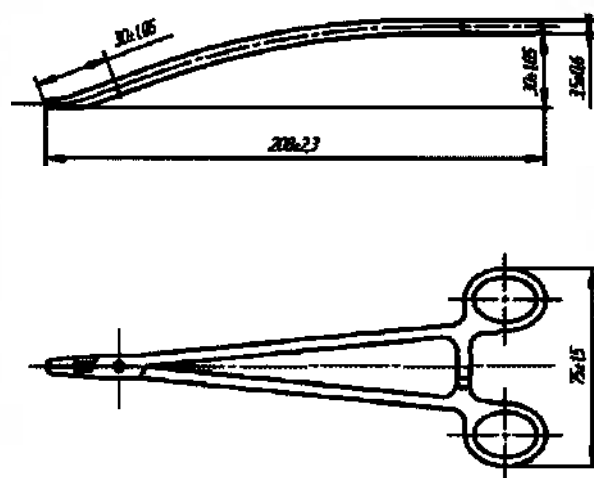


Рисунок 1.12 - 23-2343R Иглодержатель






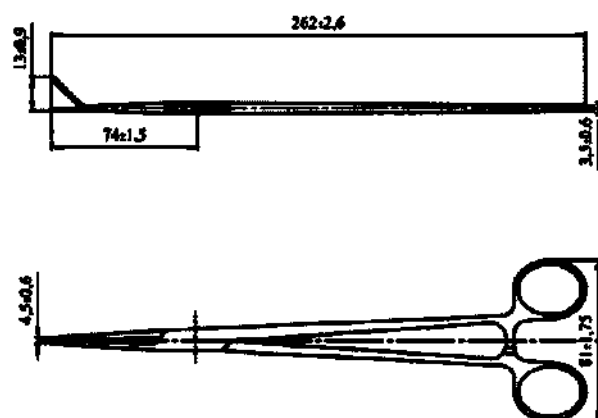


Рисунок 1.13 - 23-2145R Иглодержатель

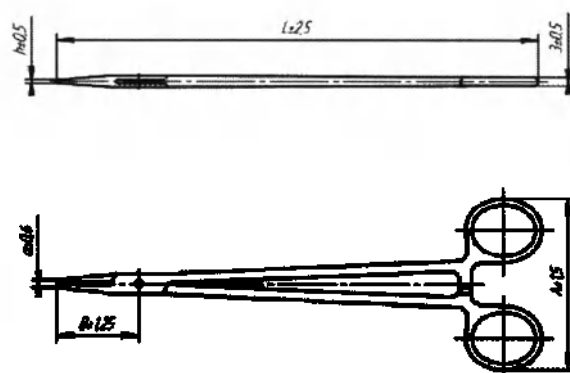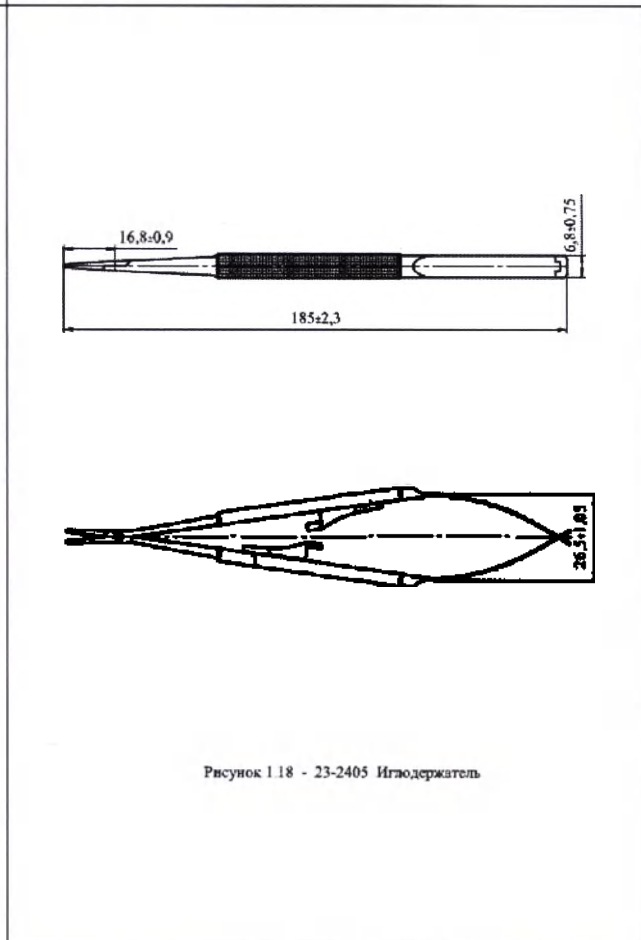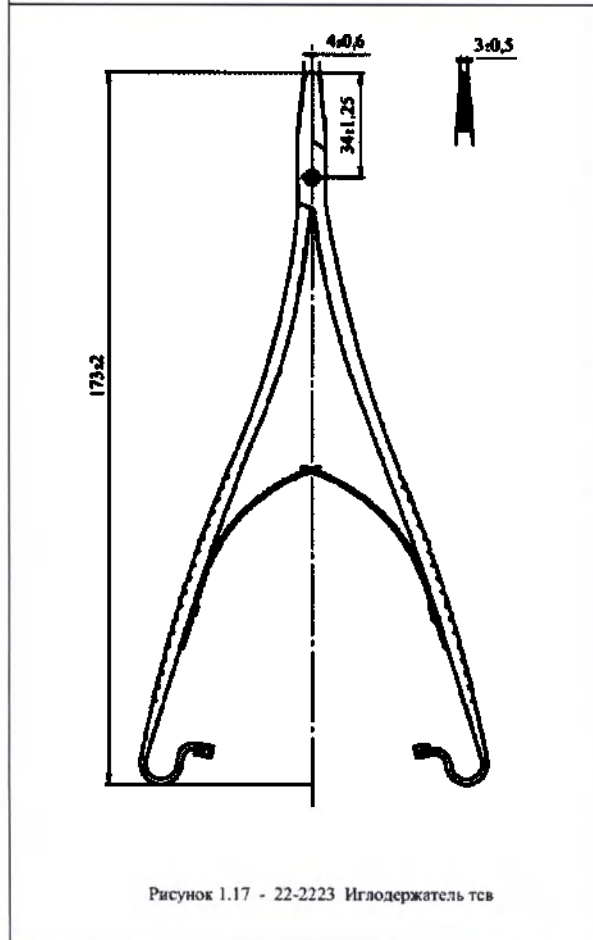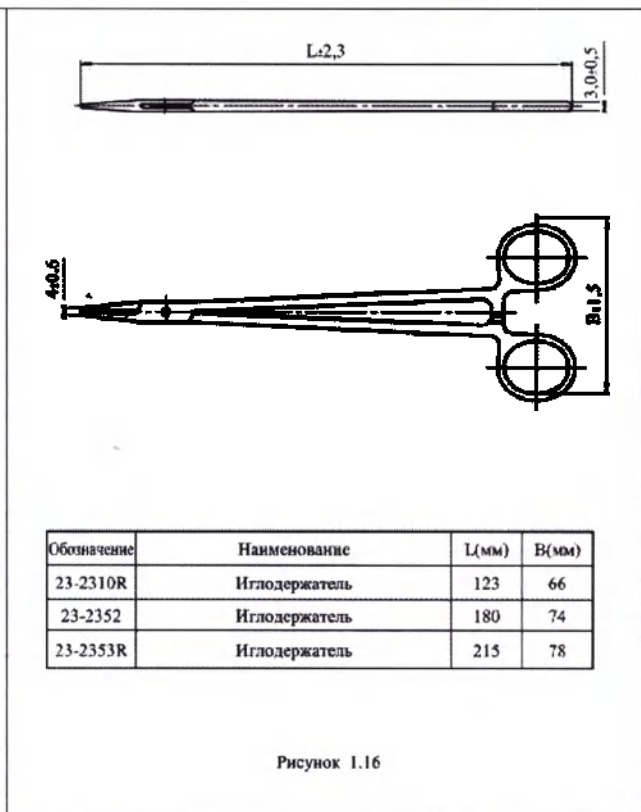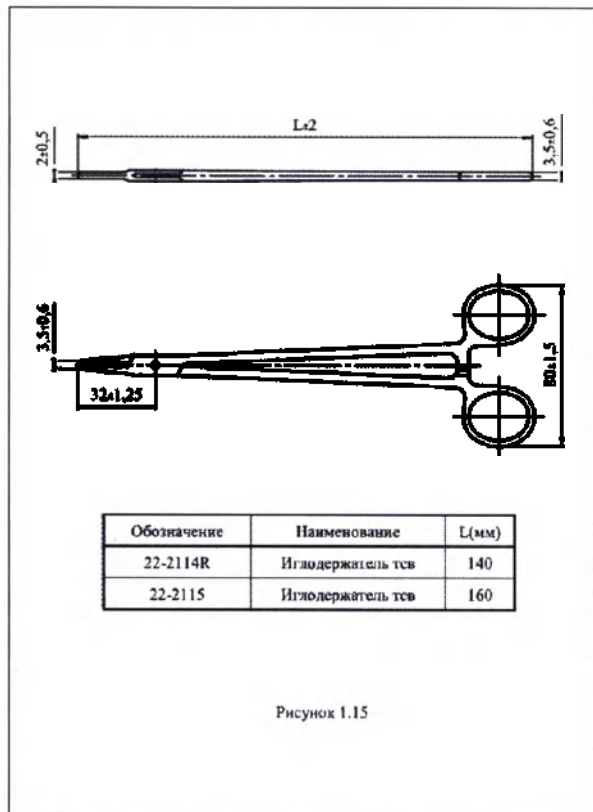

Обозначение	Наименование	L(мм)	h(мм)	a(мм)	B(мм)	A(мм)
22-2192R	Иглодержатель тсв	125	2	3	28	71
22-2200	Иглодержатель тсв	140	2	3	28	71,5
22-2201	Иглодержатель тсв	160	2	3,5	30	72
22-2202	Иглодержатель тсв	180	2	4	30	72,5
22-2203	Иглодержатель тсв	200	2,5	4,5	33	73,5
22-2206R	Иглодержатель тсв	215	2,5	4,5	33	75
22-2205	Иглодержатель тсв	250	2,5	4,5	34	80

Рисунок 1.14




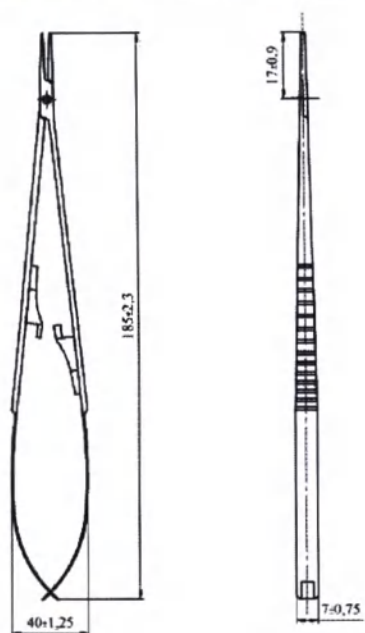


Рисунок 1.19 - 23-2405R Иглодержатель

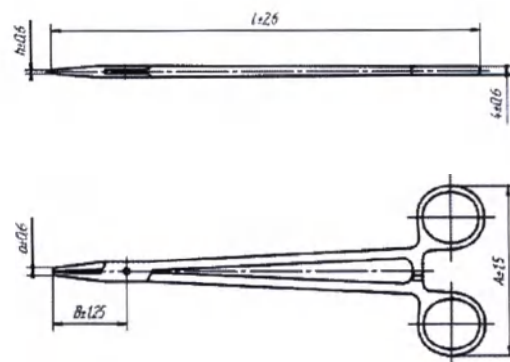

Обозначение	Наименование	L (мм)	A(мм)	B(мм)	h(мм)	ж(мм)
23-2331R	Иглодержатель	165	73,0	30	2,5	3
23-2333R	Иглодержатель	205	75,5	33	3,0	3,5
23-2335R	Иглодержатель	255	77,5	35	3,2	5,0

Рисунок 1.20

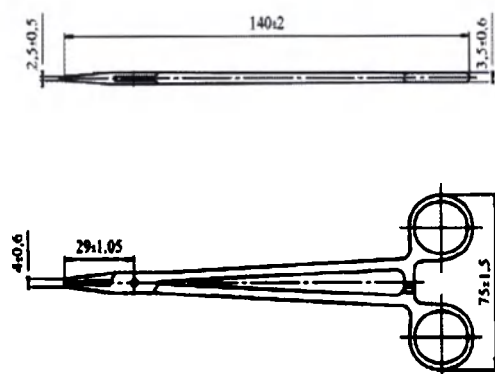


Рисунок 1.21 - 22-2200R Иглодержатель



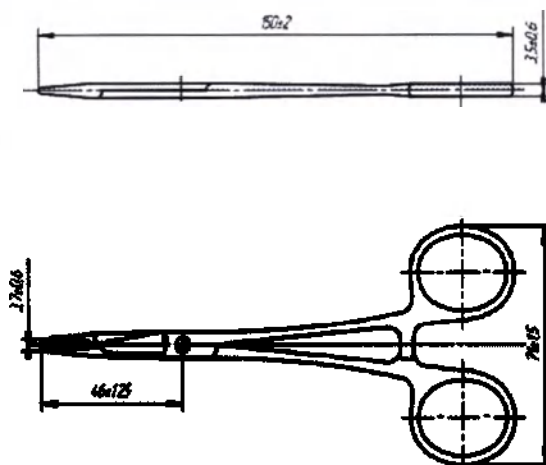


Рисунок 1.22 - 23-2357NR Иглодержатель-ножницы

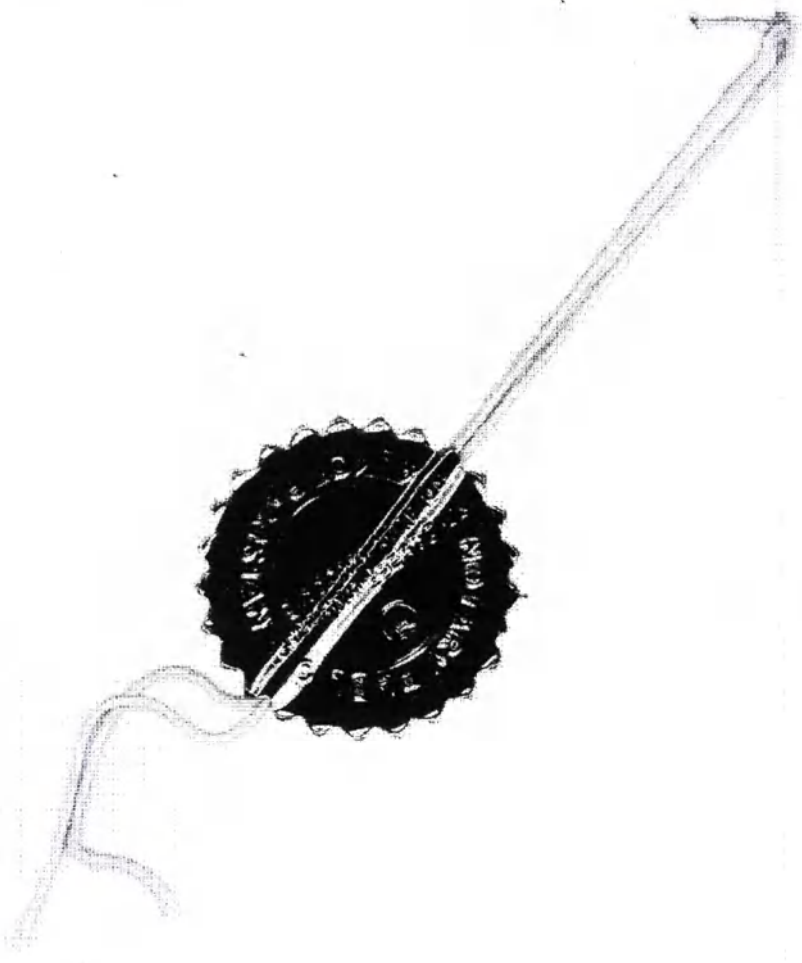

ATTESTED

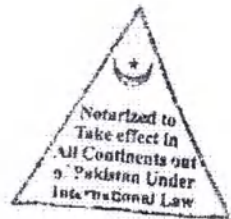

Перевод штампов, печатей и апостиля в Инструкции по эксплуатации Инструменты медицинские хирургические в вариантах исполнения иглодержатели

Марка: В435086
100 рупий

Печать: Сялкот, Пакистан,
Нотариус,
Захир Хайдер Аван,
Адвокат Верховного суда

АПОСТИЛЬ

1. Страна: Исламская Республика Пакистан
Настоящий официальный документ
2. Был подписан: Захиром Хайдером Аваном
3. Выступающем в качестве: НОТАРИУСА ПРАВИТЕЛЬСТВА ПАКИСТАНА
4. Скреплен печатью/штампом: ЗАХИРА ХАЙДЕРА АВАНА (АДВОКАТ ВЕРХОВНОГО СУДА)
НОТАРИУС
СИАЛКОТ, ПАКИСТАН

УДОСТОВЕРЕНО

5. в г. СИАЛКОТ, ПАКИСТАН

6. 13 июля 2022 года

7. АДВОКАТОМ ВЕРХОВНОГО СУДА, НОТАРИУСОМ ПАКИСТАНА

8. № С.С. 6845

9. Печать/штамп:
/подпись/

Печать: Удостоверено и действительно на территории всех стран за пределами Пакистана, в соответствии с нормами международного права.

Штамп: Удостоверено
/подпись/

Печать: Окружной суд г. Сялкот, Пакистан,
Нотариус,
Захир Хайдер Аван,
Адвокат Верховного суда

Компания Сурдживелл, Пакистан, Сялкот, Дефенс Роуд,
Ниар Поли Техникал Стафф Колони

861
13-07-2022

Аффидевит

Аффидевит Пакистан

М. Салман
/подпись/

Штамп: Ахмед
Штамп продавца
Лицензия № 3
Кутчери

Штамп: СУРДЖИВЕЛЛ
Хирургические инструменты
Пакистан, 51310, Сялкот, Дефенс Роуд
/подпись/

Печать: Сялкот, Пакистан,
Нотариус,
Захир Хайдер Аван,
Адвокат Верховного суда

Печать: Удостоверено и действительно на территории всех стран за пределами Пакистана, в соответствии с нормами международного права.

Штамп: Удостоверено
/подпись/

Печать: Окружной суд г. Сялкот, Пакистан,
Нотариус,
Захир Хайдер Аван,
Адвокат Верховного суда

Перевод с английского языка на русский язык выполнен мной,
Переводчиком Радонцевым Максимом Юрьевичем



Российская Федерация
Город Нижний Новгород

Четырнадцатого июля две тысячи двадцать второго года

Я, Кузнецова Юлия Валерьевна, нотариус города областного значения Нижнего Новгорода, свидетельствую подлинность подписи переводчика РАДОНЦЕВА МАКСИМА ЮРЬЕВИЧА.

Подпись сделана в моем присутствии.

Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: № 52/310-н/52-2022-7-307.

Уплачено за совершение нотариального действия: 663 руб. 00 коп.



Ю.В.Кузнецова



Прошнуровано, пронумеровано и
скреплено печатью 17 (семнадцать) листов.



Российская Федерация
Город Нижний Новгород

Четырнадцатого июля две тысячи двадцать второго года

Я, Дубова Светлана Авенировна, нотариус города областного значения Нижнего Новгорода, свидетельствую верность копии с представленного мне документа.

Зарегистрировано в реестре: № 52/38-н/52-2022-2-631.

Уплачено за совершение нотариального действия: 1800 руб. 00 коп.



С.А.Дубова