

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Здравмедтех-Н»

А.И. Клевасов

2022 г.



Комплекты белья, одежды и медицинских изделий акушерско-гинекологические одноразовые стерильные, в вариантах исполнения

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Версия 2

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1.1 Общая информация

Комплекты белья, одежды и медицинских изделий акушерско-гинекологические одноразовые стерильные, в вариантах исполнения (далее по тексту – Изделие).

Производитель Изделия:

Общество с ограниченной ответственностью «Здравмедтех-Новосибирск» (ООО «Здравмедтех-Н»).

Юридический адрес: 630091, Новосибирская область, г.о. город Новосибирск, г. Новосибирск, ул. Советская 64/1, оф. 607.

тел: +7 (383) 209-22-30, e-mail: Info@zmt-nsk.ru

Место производства: Россия, 633004, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Химзаводская, д. 11/90.

Класс Изделия в зависимости от степени потенциального риска применения в соответствии с ГОСТ 31508 – 1.

Изделие поставляется **стерильным**.

Изделие однократного применения.

1.2 Назначение изделия

Изделие предназначено для выполнения акушерско-гинекологических медицинских процедур и хирургических вмешательств при родоразрешении и гинекологических операциях в медицинских организациях.

Область применения: общебольничные медицинские изделия.

Потенциальные потребители: медицинский персонал медицинских организаций.

Показания к применению: самопроизвольное родоразрешение, оперативное родоразрешение, гинекологические процедуры и операции.

Противопоказания: не выявлены.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Компоненты, входящие в состав Изделия, представлены в таблице 1.

Таблица 1. Компоненты Изделия

№	Наименование	№ рисунка Приложения В
1.	Бахилы <i>Варианты исполнения:</i> 1) Бахилы на ступню (носки) (200-500) мм с шагом 5 мм 2) Бахилы полиэтиленовые (200-500) мм с шагом 5 мм 3) Бахилы хирургические высокие (360-500) мм с шагом 5 мм (с резинкой или с завязками)	1а, 1б, 1в
2.	Бирка (медальон) для новорожденного <i>Варианты исполнения:</i>	-

	1) Набор для новорожденных APEXMED: Идентификационный медальон с устройством крепления к кровати (ПУ № ФСЗ 2012/12136)	
3.	Браслет для новорожденного <i>Варианты исполнения:</i> 1) Набор для новорожденных APEXMED: Браслет для фиксации на ручках малыша (ПУ № 2012/12136) 2) Изделия медицинские для первичной обработки новорожденных: Браслет идентификационный (ПУ № ФСЗ 2009/03563)	-
4.	Брюки (размеры 40-42, 44-48, 50-54, 56-60, 62-66, 68-72, 74-76, длина 900-1200 мм с шагом 5 мм, пояс на резинке или на завязках, низ прямой или на резинке или на манжете, с карманами или без карманов)	2
5.	Зажим для пуповины <i>Варианты исполнения:</i> 1) Зажим для пуповины одноразовый SUYUN (ПУ № ФСЗ 2010/06848) 2) Изделия медицинские для первичной обработки новорожденных: Зажим для пуповины одноразовый (ПУ № ФСЗ 2009/03563)	-
6.	Зеркало по Куско <i>Варианты исполнения:</i> 1) Зеркало гинекологическое стерильное одноразовое - с боковым винтовым фиксатором (размеры S, M, L); - с центральным винтовым фиксатором (размеры S, M, L); - с центральным поворотным фиксатором (размеры S, M, L); - с центральным блокировочным поворотным фиксатором (размеры S, M, L) (ПУ № РЗН 2014/2269) 2) Зеркало гинекологическое одноразовое по Куско по ТУ 9434-010-54287340-2016 в вариантах исполнения: 1. Зеркало гинекологическое одноразовое по Куско малое (S) стерильное. 2. Зеркало гинекологическое одноразовое по Куско среднее (M) стерильное. 3. Зеркало гинекологическое одноразовое по Куско большое (L) стерильное (ПУ № РЗН 2018/7146) 3) Зеркала гинекологические полимерные по Куско одноразового использования стерильные по ТУ 32.50.13-075-44942795-2017: 1. Зеркало гинекологическое полимерное по Куско № 1 (S) прозрачное с центральным поворотным фиксатором одноразового использования стерильное. 2. Зеркало гинекологическое полимерное по Куско № 2 (M) прозрачное с центральным поворотным фиксатором одноразового использования стерильное. 3. Зеркало гинекологическое полимерное по Куско № 3 (L) прозрачное с центральным поворотным фиксатором одноразового использования стерильное. 4. Зеркало гинекологическое полимерное по Куско № 1 (S) белое с центральным поворотным фиксатором одноразового использования стерильное. 5. Зеркало гинекологическое полимерное по Куско № 2 (M) белое с центральным поворотным фиксатором одноразового использования стерильное. 6. Зеркало гинекологическое полимерное по Куско № 3 (L) белое с центральным поворотным фиксатором одноразового	-

	использования стерильное. 7. Зеркало гинекологическое полимерное по Куско № 1 (S) золотистое с центральным поворотным фиксатором одноразового использования стерильное. 8. Зеркало гинекологическое полимерное по Куско № 2 (M) золотистое с центральным поворотным фиксатором одноразового использования стерильное. 9. Зеркало гинекологическое полимерное по Куско № 3 (L) золотистое с центральным поворотным фиксатором одноразового использования стерильное. 10. Зеркало гинекологическое полимерное по Куско № 1 (S) прозрачное с центральным винтовым фиксатором одноразового использования стерильное. 11. Зеркало гинекологическое полимерное по Куско № 2 (M) прозрачное с центральным винтовым фиксатором одноразового использования стерильное. 12. Зеркало гинекологическое полимерное по Куско № 3 (L) прозрачное с центральным винтовым фиксатором одноразового использования стерильное. 13. Зеркало гинекологическое полимерное по Куско № 1 (S) белое с центральным винтовым фиксатором одноразового использования стерильное. 14. Зеркало гинекологическое полимерное по Куско № 2 (M) белое с центральным винтовым фиксатором одноразового использования стерильное. 15. Зеркало гинекологическое полимерное по Куско № 3 (L) белое с центральным винтовым фиксатором одноразового использования стерильное. 16. Зеркало гинекологическое полимерное по Куско № 1 (S) золотистое с центральным винтовым фиксатором одноразового использования стерильное. 17. Зеркало гинекологическое полимерное по Куско № 2 (M) золотистое с центральным винтовым фиксатором одноразового использования стерильное. 18. Зеркало гинекологическое полимерное по Куско № 3 (L) золотистое с центральным винтовым фиксатором одноразового использования стерильное. (ПУ № РЗН 2018/7077) 4) Зеркало гинекологическое полимерное двухстворчатое однократного применения стерильное по ТУ 9393-005-27380060-2006 в составе: - зеркало №1 (S) или №2 (M) или №3 (L) (ПУ № ФСР 2008/03043) 5) Инструменты медицинские для осмотра пациентов и взятия биологических образцов: - зеркало гинекологическое (ПУ № ФСЗ 2011/09222) 6) Зеркала гинекологические по Куско по ТУ РБ 300046934.009-2002: - зеркало гинекологическое по Куско № 1/S; - зеркало гинекологическое по Куско № 2/M; - зеркало гинекологическое по Куско № 3/L; - зеркало гинекологическое по Куско «Юнона» № 1/S; - зеркало гинекологическое по Куско «Юнона» № 2/M; - зеркало гинекологическое по Куско «Юнона» № 3/L (ПУ № ФСЗ 2007/00493)	
7.	Карман-приемник (липкий край/фиксатор) (100-800)x(100-1000) мм с шагом 5 мм	3
8.	Коврик (400-1000)x(400-1000) мм с шагом 5 мм	4
9.	Комбинезон Варианты исполнения:	5а, 5б

	1) Комбинезон (размеры 44-48, 50-54, 56-60, 62-66, 68-72, 74-76, длина 1500-2000 мм с шагом 5 мм, рукава на резинке или на манжете, низ брюк на резинке или на манжете, застежка молния или липа) 2) Комбинезон (размеры 46-48, 50-52, 54-56, 58-60, 62-64, 68-72, 74-76, длина 1780-2500 мм с шагом 5 мм, рукава на резинке или на манжете, застежка молния или липа, встроенные бахилы)	
10.	Комбинезон для новорожденного (300-600)х(400-800) мм с шагом 5 мм	6
11.	Конверт для новорожденного (200-600)х(300-800) мм с шагом 5 мм	7
12.	Костюм хирургический (куртка (размеры 40-42, 44-48, 50-54, 56-60, 62-66, 68-72, 74-76, рукава на резинке или на манжете) или куртка «Евростандарт» (размеры 40-42, 44-48, 50-54, 56-60, 62-66, 68-72, 74-76, цельнокроеный рукав, с карманами или без карманов), рубашка (размеры 40-42, 44-48, 50-54, 56-60, 62-66, 68-72, 74-76, втачной рукав) или рубашка (размеры 40-42, 44-48, 50-54, 56-60, 62-66, 68-72, 74-76, цельнокроеный рукав), брюки (размеры 40-42, 44-48, 50-54, 56-60, 62-66, 68-72, 74-76, длина 900-1200 мм с шагом 5 мм, пояс на резинке или на завязках, низ прямой или на резинке или на манжете, с карманами или без карманов), юбка (размеры 40-42, 44-48, 50-54, 56-60, 62-66, 68-72, 74-76, пояс на резинке или на завязках)	8а, 8б, 8в, 8г, 8д, 8е
13.	Куртка <i>Варианты исполнения:</i> 1) Куртка (размеры 40-42, 44-48, 50-54, 56-60, 62-66, 68-72, 74-76, рукава на резинке или на манжете, с карманами или без карманов) 2) Куртка «Евростандарт» (размеры 40-42, 44-48, 50-54, 56-60, 62-66, 68-72, 74-76, цельнокроеный рукав, с карманами или без карманов)	9а, 9б
14.	Лента операционная (10-500)х(10-500) мм с шагом 5 мм	10
15.	Ложка Фолькмана <i>Варианты исполнения:</i> 1) Инструменты гинекологические: ложка Фолькмана по ТУ РБ 300046934.008-2002 (ПУ № ФСЗ 2007/00495)	-
16.	Маска медицинская <i>Варианты исполнения:</i> 1) Маска медицинская одноразовая по ТУ 32.50.50-011-70516780-2020 в вариантах исполнения: Маска медицинская (140-200)х(90-140) на завязках; Маска медицинская (140-200)х(90-140) на резинках. (ПУ № РЗН 2020/10074)	-
17.	Маска медицинская с защитным экраном <i>Варианты исполнения:</i> 1) Маска медицинская одноразовая по ТУ 32.50.50-011-70516780-2020 в вариантах исполнения: Маска медицинская (140-200)х(90-140) с экраном на завязках; Маска медицинская (140-200)х(90-140) с экраном на резинках (ПУ № РЗН 2020/10074)	-
18.	Мешок (липкий край) (100-1000)х(100-1000) мм с шагом 5 мм	11
19.	Мешок для медицинских отходов (100-1000)х(100-1000) мм с шагом 5 мм	12
20.	Наволочка (200-1000)х(200-1000) мм с шагом 5 мм	13
21.	Накидка (500-1700)х(800-1500) мм с шагом 5 мм	14
22.	Наматрачник (400-4000)х(400-4000) мм с шагом 5 мм	15

23.	Нарукавники <i>Варианты исполнения:</i> 1) Нарукавники (150-700)х(300-1200) мм с шагом 5 мм (верх на резинке, низ на манжете) 2) Нарукавники (150-700)х(300-1200) мм с шагом 5 мм (верх на резинке, низ на резинке)	16а, 16б
24.	Одеяло педиатрическое (500-4000)х(500-4000) мм с шагом 5 мм	17
25.	Пеленка (200-1000)х(200-1000) мм с шагом 5 мм	18
26.	Пеленка впитывающая многослойная (400-4000)х(400-4000) мм с шагом 5 мм	19
27.	Перчатки <i>Варианты исполнения:</i> 1) Перчатки хирургические и смотровые, стерильные по ТУ 9398-002-54854000-2011 следующих типоразмеров: 1. Перчатки хирургические стерильные из натурального латекса опудренные №№ 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0. 2. Перчатки хирургические стерильные из натурального латекса неопудренные №№ 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0. 3. Перчатки хирургические стерильные из синтетического латекса неопудренные №№ 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0. 4. Перчатки смотровые стерильные из натурального латекса опудренные №№ XS, S, M, L, XL. 5. Перчатки смотровые стерильные из натурального латекса неопудренные №№ XS, S, M, L, XL. 6. Перчатки смотровые стерильные из синтетического латекса неопудренные №№ XS, S, M, L, XL (ПУ № ФСП 2011/12244) 2) Перчатки медицинские NG MEDICAL по ТУ 9398-001-90610765-2012, варианты исполнения: 1. Перчатки хирургические стерильные NG Medical Master St, размеры: 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0 (ПУ № РЗН 2013/701) 3) Перчатки одноразовые медицинские диагностические (смотровые) стерильные «Basic» Optima латексные неопудренные текстурированные (ПУ № РЗН 2013/1070)	-
28.	Пинетки (100-180) мм с шагом 5 мм	20
29.	Повязка (20-500)х(20-800) мм с шагом 5 мм	21
30.	Пододеяльник (400-4000)х(400-4000) мм с шагом 5 мм	22
31.	Подстилка (400-4000)х(400-4000) мм с шагом 5 мм	23
32.	Покрывало педиатрическое (500-4000)х(500-4000) мм с шагом 5 мм	24
33.	Пленка операционная (10-800)х(10-1000) мм с шагом 5 мм	25
34.	Ползунки (200-350)х(400-600) мм с шагом 5 мм	26
35.	Полотенце (салфетка) (100-1000)х(100-1000) мм с шагом 5 мм	27
36.	Презерватив для УЗИ <i>Варианты исполнения:</i> 1) Презерватив латексный для УЗИ по ТУ 21.20.23-012-01716953-2018, варианты исполнения: I. Презерватив латексный для УЗИ, размер, мм: D 20 в составе: 1. Презерватив латексный для УЗИ, размер, мм: D 20 - по 1 шт./уп. во вторичной потребительской упаковке; II. Презерватив латексный для УЗИ, размер, мм: D 28 в составе: 1. Презерватив латексный для УЗИ, размер, мм: D 28 - по 1 шт./уп. во вторичной потребительской упаковке; III. Презерватив латексный для УЗИ, размер, мм: D 34 в составе: 1. Презерватив латексный для УЗИ, размер, мм: D 34 - по 1	-

	шт./уп. во вторичной потребительской упаковке (ПУ № РЗН 2019/8659) 2) Чехол защитный (презерватив) для датчика УЗИ по ТУ 22.19.71-040-17707123-2019, варианты исполнения: - презерватив для УЗИ, ø 18мм; - презерватив для УЗИ, ø 20мм; - презерватив для УЗИ, ø 28мм; - презерватив для УЗИ, ø 33мм; - презерватив для УЗИ, ø 34мм (ПУ № РЗН 2020/10694) 3) Презервативы латексные для УЗИ «АЗРИ» ДИАмед по ТУ 9398-087-00149498-2006 (ПУ № ФСР 2007/00033)	
37.	Прокладка (70-150)х(210-400) мм с шагом 5 мм	28
38.	Простыня операционная (покрытие) (400-4000)х(400-4000) мм с шагом 5 мм	29
39.	Простыня операционная (покрытие) (400-4000)х(400-4000) мм с шагом 5 мм (впитывающая зона/липкий край)	30
40.	Простыня операционная (покрытие) (400-4000)х(400-4000) мм с шагом 5 мм, с отверстием (20-400)х(20-600)мм или диаметром (20-600)мм (операционная пленка/ впитывающая зона/ липкий край/ мешок для сбора жидкости (фиксатор/фильтр)/ карман (фиксатор/отвод)/ градуированная сумка (отвод)/ дополнительные вставки/ встроенные бахилы)	31
41.	Простыня операционная (покрытие) (400-4000)х(400-4000) мм с шагом 5 мм с отверстием (20-400)х(20-600) мм или диаметром (20-600) мм (липкий край/впитывающая зона/операционная пленка/напальчник/встроенные бахилы/покрытие для ног/карман/мешок/сумка градуированная/фиксатор)	32
42.	Простыня операционная (покрытие) (400-4000)х(400-4000) мм с шагом 5 мм с отверстием (20-400)х(20-600) мм или диаметром (20-600) мм (операционная пленка/карман/отвод/липкий край/фиксатор/впитывающая зона/встроенная полусфера)	33
43.	Распашонка (150-300)х(200-400) мм с шагом 5 мм	34
44.	Рубашка <i>Варианты исполнения:</i> 1) Рубашка (размеры 40-42, 44-48, 50-54, 56-60, 62-66, 68-72, 74-76, втачной рукав) 2) Рубашка (размеры 40-42, 44-48, 50-54, 56-60, 62-66, 68-72, 74-76, цельнокроеный рукав)	35а, 35б
45.	Рубашка для новорожденного (150-300)х(200-400) мм с шагом 5 мм	36
46.	Рубашка для роженицы (800-1500)х(700-1700) мм с шагом 5 мм (с круглой или с V-образной горловиной)	37
47.	Салфетка хирургическая (200-1000)х(200-1000) мм с шагом 5 мм	38
48.	Тапочки (280-350) мм с шагом 5 мм	39
49.	Трусики (200-400)х(500-750) мм с шагом 5 мм	40
50.	Фартук хирургический (500-900)х(800-1200) мм с шагом 5 мм	41
51.	Фиксатор (держатель шнура) (20-300)х(300-2000) мм с шагом 5 мм	42
52.	Халат хирургический (размеры 44-48, 50-54, 56-60, 62-66, 68-72, 74-76, длина 1050-1750 мм с шагом 5 мм, горловина на завязках или на липе, рукава на резинке или на манжете, с поясом)	43
53.	Цитощетка <i>Варианты исполнения:</i> 1) Щетки гинекологические для цитологического исследования одноразового применения стерильные и нестерильные: цитощетка "ДиаТест" и цервикальная щетка "ДиаСкрин" по ТУ 9398-006-18078209-2008 (ПУ № ФСР 2009/04068)	-

	2) Зонды гинекологические MR одноразовые стерильные: цитощетка: типов D1, D2, D3; (ПУ № РЗН 2015/2325)	
54.	Чепчик (50-130)х(100-180) мм с шагом 5 мм	44
55.	Чехол (200-4000)х(200-4000) мм с шагом 5 мм	45
56.	Чехол хирургический на инструментальный столик (100-3000)х(100-3000) мм с шагом 5 мм (впитывающая зона/ липкий край/ карман/ карман с фиксатором/ откидная пеленка)	46
57.	Чехол хирургический на инструментальный столик (100-3000)х(100-3000)х(100-3000) мм с шагом 5 мм (впитывающая зона/ липкий край/ карман/ карман с фиксатором/ откидная пеленка)	47
58.	Чехол на оборудование (20-3000)х(50-4000) мм с шагом 5 мм или диаметром (50-4000) мм (завязки/ кулиски/ липкий край/ фиксатор)	48
59.	Чулки (носки) (200-500)х(300-1500) мм с шагом 5 мм	49
60.	Шапочка (колпак) <i>Варианты исполнения:</i> 1) Шапочка-берет 2) Шапочка-колпак 3) Шапочка-колпак (окантовка) 4) Шапочка-колпак (с потовпитывающей полоской или без потовпитывающей полоски) 5) Шапочка-косынка 6) Шапочка-пилотка (на завязках или без завязок) 7) Шапочка-косак 8) Шапочка-шлем (пелерина, кулиски) (с потовпитывающей полоской или без потовпитывающей полоски)	50а, 50б, 50в, 50г, 50д, 50е, 50ж, 50з
61.	Шпатель <i>Варианты исполнения:</i> 1) Шпатель деревянный стерильный одноразового использования (ПУ № РЗН 2019/8810) 2) Шпатель медицинский деревянный стерильный по ТУ 32.50.13.190-001-21345855-2017 в вариантах исполнения: 1. Шпатель медицинский деревянный одноразовый стерильный 140х18 мм. 2. Шпатель медицинский деревянный одноразовый стерильный 150х18 мм (ПУ № РЗН 2017/5416) 3) Шпатель медицинский одноразовый деревянный по ТУ 9434-002-83144357-2010 (ПУ № ФСР 2010/08671) 4) Шпатель терапевтический TOPMED, варианты исполнения: деревянный, деревянный педиатрический, пластиковый (ПВХ) (ПУ № РЗН 2017/6438) 5) Шпатель для гинекологических обследований двухсторонний, полимерный, однократного применения стерильный по ТУ 9393-011-27380060-2011 (ПУ № ФСР 2011/11274) 6) Шпатель медицинский деревянный стерильный однократного применения по ТУ 32.50.13-002-15013959-2018 типов: 1 и 2 (ПУ № РЗН 2019/9415) 7) Инструменты медицинские для осмотра пациентов и взятия биологических образцов - шпатель гинекологический (ПУ № ФСЗ 2011/09222) 8) Шпатели медицинские одноразовые стерильные по ТУ 32.50.13-002-93663130-2019 в вариантах исполнения: 1. Шпатель прямой 2. Шпатель изогнутый (ПУ № РЗН 2020/9924)	

	9) Шпатель медицинский деревянный шлифованный стерильный по ТУ 9398-008-56334457-2010 (ПУ № ФСР 2010/08869)	
62.	Шпатель Эйра Варианты исполнения: 1) Инструменты гинекологические: шпатель Эйра по ТУ РБ 300046934.008-2002 (ПУ № ФСЗ 2007/00495) 2) Шпатель по Эйру по ТУ 9398-022-18603495-2010 (ПУ № ФСР 2011/10245)	-
63.	Юбка (размеры 40-42, 44-48, 50-54, 56-60, 62-66, 68-72, 74-76, пояс на резинке или на завязках)	51

Халат хирургический соответствуют требованиям к исполнению, указанным в таблице 2:

Таблица 2. Требования к исполнению халата хирургического

Характеристика	Единица измерения	Требование			
		стандартное исполнение		высококачественное исполнение	
		критическая* зона изделия	менее критическая зона изделия	критическая* зона изделия*	менее критическая зона изделия
Микробная проницаемость в сухом состоянии	Lg (CFU)	Не требуется	≤2	Не требуется	≤2
Микробная проницаемость во влажном состоянии	BI	≥2,8	Не требуется	6,0 ^{а)}	Не требуется
Чистота микробная	Lg (CFU/дм ²)	<2	<2	<2	<2
Чистота в части инородных частиц	IPM	<3,5	<3,5	<3,5	<3,5
Пыле-, ворсоотделение	Lg (от подсчитанных частиц корпии)	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0
Водоупорность	см H ₂ O	≥20	≥10	≥100	≥10
Прочность на разрыв в сухом состоянии	кПа	≥40	≥40	≥40	≥40
Прочность на разрыв во влажном состоянии	кПа	≥40	Не требуется	≥40	Не требуется
Прочность на растяжение в сухом состоянии	Н	≥20	≥20	≥20	≥20
Прочность на растяжение во влажном состоянии	Н	≥20	Не требуется	≥20	Не требуется
* Критическая зона халата – передняя полочка и рукава					
^{а)} BI = 6,0 означает: проникновение отсутствует. BI=6,0 является максимально достижимым значением.					

Костюм хирургический (куртка, рубашка, брюки, юбка), комбинезон соответствуют требованиям к исполнению, указанным в таблице 3:

Таблица 3. Требования к исполнению костюма хирургического, комбинезона

Характеристика	Единица измерения	Требование
Микробная проницаемость в сухом состоянии	Lg (CFU)	≤2

Чистота микробная	Lg (CFU/дм ²)	<2
Чистота в части инородных частиц	IPM	<3,5
Пыле-, ворсоотделение	Lg (от подсчитанных частиц корпии)	<4,0
Прочность на разрыв в сухом состоянии	кПа	≥40
Прочность на растяжение в сухом состоянии	Н	≥20

Грузоподъемность мешка – не менее 2 кг, мешка для медицинских отходов – не менее 5 кг.

Сорбционные свойства полотенца (салфетки), прокладки, салфетки хирургической, пленки впитывающей многослойной, впитывающих зон простыней операционных:

- сорбционная емкость не менее 0,001 л/дм²;
- время смачивания от 1 до 5 секунд;

Изделие устойчиво к климатическим воздействиям при эксплуатации в температурном диапазоне от плюс 10°C до плюс 35°C и относительной влажности не более 80%.

3. МАТЕРИАЛЫ

Изделие производится из нетоксичных материалов, указанных в таблице 4.

Таблица 4. Материалы, используемые при производстве

№ п/п	Наименование	Состав (марка)	Производитель	Плотность, г/м ² / толщина, мкм	Перечень применения
1.	Нетканый многослойный материал на основе полипропилена	Нетканое полипропиленовое полотно по ТУ 8390-010-74582615-2009 Марка: СМС Состав: 100% полипропилен Материал нетканый из химических нитей по ТУ 13.95.10.112-001-77056896-2019 Марка: спанбонд SB, СМС, SMS Сырьевой состав: полипропилен 100% Материал: CREATEX-KOMFORT K20035-68-103 CREATEX-KOMFORT K20035-68-104 по ТУ 13.95.10-001-28566401-18	ООО «Завод Эластик» ООО «Авгол» ООО «Нетканика»	(12-80) г/м ²	- Бахилы - Брюки - Карман – приемник - Коврик - Комбинезон - Комбинезон для новорожденного - Конверт для новорожденного - Костюм хирургический (куртка, рубашка, брюки, юбка) - Куртка - Лента операционная - Мешок - Мешок для медицинских отходов - Наволочка - Накидка - Наматрачник - Нарукавники - Одеяло педиатрическое - Пеленка - Пинетки - Повязка - Пододельник - Подстилка - Полотенце (салфетка) - Простыня операционная (покрытие) (400-4000)х(400-4000) мм - Простыня операционная (покрытие) (400-4000)х(400-4000) мм (впитывающая зона/липкий край)

		Сырьевой состав: полипропилен 100% Полотно нетканое «Полиспан Меди» по СТО 96891647- 002-2009 Марка: СМС Сырьевой состав: полипропилен 100 %	АО «Полиматиз»		26. Простыня операционная (покрытие) (400-4000)х(400-4000)мм, с отверстием (20-400)х(20-600)мм или диаметром (20-600)мм (операционная пленка/впитывающая зона/ липкий край/ мешок для сбора жидкости (фиксатор/фильтр)/ карман (фиксатор/ отвод)/ градуированная сумка (отвод)/ дополнительные вставки/ встроенные бахилы) 27. Простыня операционная (покрытие) (400-4000)х(400-4000) мм с отверстием (20-400)х(20-600) мм или диаметром (20-600) мм (липкий край/впитывающая зона/операционная пленка/напальчник/встроенные бахилы/покрытие для ног/карман/мешок/сумка градуированная/фиксатор) 28. Простыня операционная (покрытие) (400-4000)х(400-4000) мм с отверстием (20-400)х(20-600) мм или диаметром (20-600) мм (операционная пленка/карман/отвод/липкий край/фиксатор/ впитывающая зона/встроенная полусфера) 29. Распашонка 30. Рубашка 31. Рубашка для новорожденного 32. Рубашка для роженицы 33. Салфетка хирургическая 34. Тапочки 35. Трусики 36. Фартук хирургический 37. Фиксатор (держатель шнура) 38. Халат хирургический 39. Чепчик 40. Чехол 41. Чехол на оборудование 42. Чехол хирургический на инструментальный столик (100-3000)х(100-3000) мм (впитывающая зона/ липкий край/ карман/ карман с фиксатором/ откидная пеленка) 43. Чехол хирургический на инструментальный столик (100-3000)х(100-3000)х(100-3000) мм (впитывающая зона/ липкий край/ карман/ карман с фиксатором/ откидная пеленка) 44. Чулки (носки) 45. Шапочка (колпак) 46. Юбка
2.	Нетканый многослойный материал на основе вискозы и полиэтилена.	Марка: ZHEJIANG BAIHAO INDUSTRY&TRADE CO.LTD Сырьевой состав: - вискоза (51,8%) - полиэтилен (48,2%)	ZHEJIANG BAIHAO INDUSTRY & TRADE CO.LTD (Китай)	(54-90) г/м ²	1. Бахилы 2. Брюки 3. Карман-приемник 4. Комбинезон 5. Костюм хирургический (куртка, рубашка, брюки, юбка) 6. Куртка 7. Коврик 8. Комбинезон для новорожденного 9. Конверт для новорожденного 10. Лента операционная

					11. Мешок (липкий край) 12. Мешок для медицинских отходов 13. Наволочка 14. Накидка 15. Наматрачник 16. Наручники 17. Одежда педиатрическое 18. Пеленка 19. Пинетки 20. Повязка 21. Пододеяльник 22. Подстилка 23. Покрывало педиатрическое 24. Ползунки 25. Полотенце (салфетка) 26. Простыня операционная (покрытие) (400-4000)х(400-4000) мм 27. Простыня операционная (покрытие) (400-4000)х(400-4000) мм (впитывающая зона/липкий край) 28. Простыня операционная (покрытие) (400-4000)х(400-4000)мм, с отверстием (20-400)х(20-600)мм или диаметром (20- 600)мм (операционная пленка/ впитывающая зона/ липкий край/ мешок для сбора жидкости (фиксатор/фильтр)/ карман (фиксатор/ отвод)/ градуированная сумка (отвод)/ дополнительные вставки/ встроенные бахилы) 29. Простыня операционная (покрытие) (400-4000)х(400-4000) мм с отверстием (20-400)х(20-600) мм или диаметром (20- 600) мм (липкий край/впитывающая зона/операционная пленка/напальчник/встроенные бахилы/покрытие для ног/карман/мешок/сумка градуированная/фиксатор) 30. Простыня операционная (покрытие) (400-4000)х(400-4000) мм с отверстием (20-400)х(20-600) мм или диаметром (20- 600) мм (операционная пленка/карман/отвод/липкий край/фиксатор/ впитывающая зона/встроенная полусфера) 31. Распашонка 32. Рубашка 33. Рубашка для новорожденного 34. Рубашка для роженицы 35. Салфетка хирургическая 36. Тапочки 37. Трусики 38. Фиксатор (держатель шнура) 39. Фартук хирургический 40. Халат хирургический 41. Чепчик 42. Чехол 43. Чехол на оборудование (завязки/ кулиса/ липкий край/ фиксатор) 44. Чехол хирургический на инструментальный столик (100- 3000)х(100-3000) мм (впитывающая зона/
--	--	--	--	--	--

					липкий край/ карман/ карман с фиксатором/ откидная пеленка) 45. Чехол хирургический на инструментальный столик (100-3000)x(100-3000)x(100-3000) мм (впитывающая зона/ липкий край/ карман/ карман с фиксатором/ откидная пеленка) 46. Чулки (носки) 47. Шапочка (колпак) 48. Юбка
3.	Нетканый многослойный материал на основе полипропилена, вискозы и полиэтилена	Марка: ZHEJIANG BAIHAO INDUSTRY&TRADE CO.LTD Сырьевой состав: - полипропилен (39,1%), - вискоза (30%), - полиэтилен (30,9%)	ZHEJIANG BAIHAO INDUSTRY&TRADE CO.LTD (Китай)	(68-76) г/м ²	1. Бахилы 2. Брюки 3. Карман-приемник 4. Коврик 5. Комбинезон 6. Комбинезон для новорожденного 7. Конверт для новорожденного 8. Костюм хирургический (куртка, рубашка, брюки, юбка) 9. Куртка 10. Лента операционная 11. Мешок 12. Мешок для медицинских отходов 13. Наволочка 14. Накидка 15. Наматрачник 16. Наручники 17. Одеяло педиатрическое 18. Пинетки 19. Пеленка Повязка 20. Пододеяльник 21. Подстилка 22. Покрывало педиатрическое 23. Ползунки 24. Полотенце (салфетка) 25. Простыня операционная (покрытие) (400-4000)x(400-4000) мм 26. Простыня операционная (покрытие) (400-4000)x(400-4000) мм (впитывающая зона/липкий край) 27. Простыня операционная (покрытие) (400-4000)x(400-4000)мм, с отверстием (20-400)x(20-600)мм или диаметром (20-600)мм (операционная пленка/ впитывающая зона/ липкий край/ мешок для сбора жидкости (фиксатор/фильтр)/ карман (фиксатор/ отвод)/ градуированная сумка (отвод)/ дополнительные вставки/ встроенные бахилы) 28. Простыня операционная (покрытие) (400-4000)x(400-4000) мм с отверстием (20-400)x(20-600) мм или диаметром (20-600) мм (липкий край/впитывающая зона/операционная пленка/напальчник/встроенные бахилы/покрытие для ног/карман/мешок/сумка градуированная/фиксатор) 29. Простыня операционная (покрытие) (400-4000)x(400-4000) мм с отверстием (20-400)x(20-600) мм или диаметром (20-600) мм (операционная

					пленка/карман/отвод/липкий край/фиксатор/ впитывающая зона/встроенная полусфера) 30. Распашонка 31. Рубашка 32. Рубашка для новорожденного 33. Рубашка для роженицы 34. Салфетка хирургическая 35. Тапочки 36. Трусики 37. Фиксатор (держатель шнура) 38. Фартук хирургический 39. Халат хирургический 40. Чепчик 41. Чехол 42. Чехол на оборудование 43. Чехол хирургический на инструментальный столик (100- 3000)x(100-3000) мм (впитывающая зона/ липкий край/ карман/ карман с фиксатором/ откидная пеленка) 44. Чехол хирургический на инструментальный столик (100- 3000)x(100-3000)x(100-3000) мм (впитывающая зона/ липкий край/ карман/ карман с фиксатором/ откидная пеленка) 45. Чулки (носки) 46. Шапочка (колпак) 47. Юбка
4.	Нетканый многослой ный материал на основе полипроп илена и полиэтиле на	Марка: ZHEJIANG BAIHAO INDUSTRY&TRAD E CO.LTD Сырьевой состав: - полипропилен (51,8%), - полиэтилен (48,2%)	ZHEJIANG BAIHAO IN- DUSTRY& TRADE CO.LTD (Китай)	(40-116) г/м ²	1. Бахилы 2. Брюки 3. Карман-приемник 4. Коврик Комбинезон 5. Комбинезон для новорожденного 6. Конверт для новорожденного 7. Костюм хирургический (куртка, рубашка, брюки, юбка) 8. Куртка 9. Лента операционная 10. Мешок 11. Мешок для медицинских отходов 12. Наволочка 13. Накидка 14. Наматрачник 15. Нарукавники 16. Одеяло педиатрическое 17. Пеленка 18. Пинетки 19. Повязка 20. Пододеяльник 21. Подстилка 22. Покрывало педиатрическое 23. Ползунки 24. Полотенце (салфетка) 25. Простыня операционная (покрытие) (400-4000)x(400-4000) мм 26. Простыня операционная (покрытие) (400-4000)x(400-4000) мм (впитывающая зона/липкий край) 27. Простыня операционная (покрытие) (400-4000)x(400-4000)мм, с отверстием (20-400)x(20-600)мм или диаметром (20- 600)мм (операционная пленка/

					впитывающая зона/ липкий край/ мешок для сбора жидкости (фиксатор/фильтр)/ карман (фиксатор/ отвод)/ градуированная сумка (отвод)/ дополнительные вставки/ встроенные бахилы) 28. Простыня операционная (покрытие) (400-4000)×(400-4000) мм с отверстием (20-400)×(20-600) мм или диаметром (20-600) мм (липкий край/впитывающая зона/операционная пленка/напальчник/встроенные бахилы/покрытие для ног/карман/мешок/сумка градуированная/фиксатор) 29. Простыня операционная (покрытие) (400-4000)×(400-4000) мм с отверстием (20-400)×(20-600) мм или диаметром (20-600) мм (операционная пленка/карман/отвод/липкий край/фиксатор/ впитывающая зона/встроенная полусфера) 30. Распашонка 31. Рубашка 32. Рубашка для новорожденного 33. Рубашка для роженицы 34. Салфетка хирургическая 35. Тапочки 36. Трусики 37. Фартук хирургический 38. Фиксатор (держатель шнура) 39. Халат хирургический 40. Чепчик 41. Чехол 42. Чехол на оборудование 43. Чехол хирургический на инструментальный столик (100-3000)×(100-3000) мм (впитывающая зона/ липкий край/ карман/ карман с фиксатором/ откидная пеленка) 44. Чехол хирургический на инструментальный столик (100-3000)×(100-3000)×(100-3000) мм (впитывающая зона/ липкий край/ карман/ карман с фиксатором/ откидная пеленка) 45. Чулки (носки) 46. Шапочка (колпак) 47. Юбка
5.	Нетканый многослойный материал «Спанлейс», изготовленный на основе вискозы и полиэфир а по технологии и спанлейс	Марка: материал нетканый «Спанлейс» по ТУ 13.95.10-006-56176857-2018 Сырьевой состав: - вискоза (30%), - полиэфир (70%)	ООО «Авангард»	(40-100) г/м ²	- Бахилы - Брюки - Коврик - Комбинезон для новорожденного - Конверт для новорожденного - Куртка - Мешок - Наволочка - Накидка - Наматрачник - Нарукавники - Одеяло педиатрическое - Пеленка - Пинетки - Повязка

					16. Пододеяльник 17. Подстилка 18. Покрывало педиатрическое 19. Ползунки 20. Полотенце (салфетка) 21. Простыня операционная (покрытие) (400-4000)х(400-4000) мм 22. Простыня операционная (покрытие) (400-4000)х(400-4000) мм (впитывающая зона/липкий край) 23. Простыня операционная (покрытие) (400-4000)х(400-4000)мм, с отверстием (20-400)х(20-600)мм или диаметром (20- 600)мм (операционная пленка/ впитывающая зона/ липкий край/ мешок для сбора жидкости (фиксатор/фильтр)/ карман (фиксатор/ отвод)/ градуированная сумка (отвод)/ дополнительные вставки/ встроенные бахилы) 24. Простыня операционная (покрытие) (400-4000)х(400-4000) мм с отверстием (20-400)х(20-600) мм или диаметром (20- 600) мм (липкий край/впитывающая зона/операционная пленка/напальчник/встроенные бахилы/покрытие для ног/карман/мешок/сумка градуированная/фиксатор) 25. Простыня операционная (покрытие) (400-4000)х(400-4000) мм с отверстием (20-400)х(20-600) мм или диаметром (20- 600) мм (операционная пленка/карман/отвод/липкий край/фиксатор/ впитывающая зона/встроенная полусфера) 26. Распашонка 27. Рубашка 28. Рубашка для новорожденного 29. Рубашка для роженицы 30. Салфетка хирургическая 31. Тапочки 32. Трусики 33. Фартук хирургический 34. Фиксатор (держатель шнура) 35. Чепчик 36. Чехол 37. Чехол на оборудование (завязки/ кулиски/ липкий край/ фиксатор) 38. Чехол хирургический на инструментальный столик (100- 3000)х(100-3000) мм (впитывающая зона/ липкий край/ карман/ карман с фиксатором/ откидная пеленка) 39. Чехол хирургический на инструментальный столик (100- 3000)х(100-3000)х(100-3000) мм (впитывающая зона/ липкий край/ карман/ карман с фиксатором/ откидная пеленка) 40. Чулки (носки) 41. Шапочка (колпак) 42. Юбка
--	--	--	--	--	--

6.	Нетканый многослойный материал «Спанлейс», изготовленный на основе вискозы и полиэфир а по технологии и спанлейс, ламинированный полиэтиленом	Марка: ZHEJIANG BAIHAO INDUSTRY&TRADE CO.LTD Сырьевой состав: - вискоза (20-30%), - полиэфир (30-40%), полиэтилен (20-30%)	ZHEJIANG BAIHAO IN-DUSTRY&TRADE CO.LTD (Китай)	(40-80) г/м ²	1. Бахилы 2. Брюки 3. Карман-приемник 4. Коврик 5. Комбинезон 6. Комбинезон для новорожденного 7. Конверт для новорожденного 8. Костюм хирургический (куртка, рубашка, брюки, юбка) 9. Куртка 10. Лента операционная 11. Мешок 12. Мешок для медицинских отходов 13. Наволочка 14. Накидка 15. Наматрачник 16. Наручники 17. Одежда педиатрическое 18. Пеленка 19. Пинетки 20. Повязка 21. Пододеяльник 22. Подстилка 23. Покрывало педиатрическое 24. Ползунки 25. Полотенце (салфетка) 26. Простыня операционная (покрытие) (400-4000)х(400-4000) мм 27. Простыня операционная (покрытие) (400-4000)х(400-4000) мм (впитывающая зона/липкий край) 28. Простыня операционная (покрытие) (400-4000)х(400-4000)мм, с отверстием (20-400)х(20-600)мм или диаметром (20-600)мм (операционная пленка/ впитывающая зона/ липкий край/ мешок для сбора жидкости (фиксатор/фильтр)/ карман (фиксатор/ отвод)/ градуированная сумка (отвод)/ дополнительные вставки/ встроенные бахилы) 29. Простыня операционная (покрытие) (400-4000)х(400-4000) мм с отверстием (20-400)х(20-600) мм или диаметром (20-600) мм (липкий край/впитывающая зона/операционная пленка/напальчник/встроенные бахилы/покрытие для ног/карман/мешок/сумка градуированная/фиксатор) 30. Простыня операционная (покрытие) (400-4000)х(400-4000) мм с отверстием (20-400)х(20-600) мм или диаметром (20-600) мм (операционная пленка/карман/отвод/липкий край/фиксатор/ впитывающая зона/встроенная полусфера) 31. Распашонка 32. Рубашка 33. Рубашка для новорожденного 34. Рубашка для роженицы 35. Салфетка хирургическая 36. Тапочки 37. Трусики
----	---	--	--	--------------------------	--

					38. Фартук хирургический 39. Фиксатор (держатель шнура) 40. Халат хирургический 41. Чепчик 42. Чехол 43. Чехол на оборудование 44. Чехол хирургический на инструментальный столик (100-3000)х(100-3000) мм (впитывающая зона/липкий край/ карман/ карман с фиксатором/ откидная пеленка) 45. Чехол хирургический на инструментальный столик (100-3000)х(100-3000)х(100-3000) мм (впитывающая зона/ липкий край/ карман/ карман с фиксатором/ откидная пеленка) 46. Чулки (носки) 47. Шапочка (колпак) 48. Юбка
7.	Нетканый многослойный материал на основе полипропилена и целлюлозы	Марка: Silk Soft СТБ 2204-20114 Сырьевой состав: - полипропилен (45%) - целлюлоза (55)	NANLIU ENTERPRISE (PINGHU) CO.,LTD (Китай)	(65-75) г/м ²	1. Бахилы 2. Брюки 3. Карман-приемник 4. Коврик Комбинезон 5. Комбинезон для новорожденного 6. Конверт для новорожденного 7. Костюм хирургический (куртка, рубашка, брюки, юбка) 8. Куртка 9. Лента операционная 10. Мешок 11. Мешок для медицинских отходов 12. Наволочка 13. Накидка 14. Наматрачник 15. Наручники 16. Одеяло педиатрическое 17. Пеленка 18. Пинетки 19. Повязка 20. Пододеяльник 21. Подстилка 22. Покрывало педиатрическое 23. Ползунки 24. Полотенце (салфетка) 25. Простыня операционная (покрытие) (400-4000)х(400-4000) мм 26. Простыня операционная (покрытие) (400-4000)х(400-4000) мм (впитывающая зона/липкий край) 27. Простыня операционная (покрытие) (400-4000)х(400-4000)мм, с отверстием (20-400)х(20-600)мм или диаметром (20-600)мм (операционная пленка/ впитывающая зона/ липкий край/ мешок для сбора жидкости (фиксатор/фильтр)/ карман (фиксатор/ отвод)/ градуированная сумка (отвод)/ дополнительные вставки/ встроенные бахилы) 28. Простыня операционная (покрытие) (400-4000)х(400-4000) мм с отверстием (20-400)х(20-600) мм или диаметром (20-600) мм (липкий край/впитывающая

					зона/операционная пленка/напальчник/встроенные бахилы/покрытие для ног/карман/мешок/сумка градуированная/фиксатор) 29. Простыня операционная (покрытие) (400-4000)×(400-4000) мм с отверстием (20-400)×(20-600) мм или диаметром (20-600) мм (операционная пленка/карман/отвод/липкий край/фиксатор/ впитывающая зона/встроенная полусфера) 30. Распашонка 31. Рубашка 32. Рубашка для новорожденного 33. Рубашка для роженицы 34. Салфетка хирургическая 35. Тапочки 36. Трусики 37. Фартук хирургический 38. Фиксатор (держатель шнура) 39. Халат хирургический 40. Чепчик 41. Чехол 42. Чехол на оборудование 43. Чехол хирургический на инструментальный столик (100-3000)×(100-3000) мм (впитывающая зона/липкий край/ карман/ карман с фиксатором/ откидная пеленка) 44. Чехол хирургический на инструментальный столик (100-3000)×(100-3000)×(100-3000) мм (впитывающая зона/ липкий край/ карман/ карман с фиксатором/ откидная пеленка) 45. Чулки (носки) 46. Шапочка(колпак) 47. Юбка
8.	Нетканый многослойный материал на основе полипропилена и вискозы	Марка: ZHEJIANG BAIHAO INDUSTRY&TRADE CO.LTD Сырьевой состав: - полипропилен (20%), - вискоза (80%)	ZHEJIANG BAIHAO IN-DUSTRY&TRADE CO.LTD (Китай)	(20-120) г/м ²	1. Бахилы 2. Брюки 3. Карман-приемник 4. Коврик 5. Комбинезон 6. Комбинезон для новорожденного 7. Конверт для новорожденного 8. Костюм хирургический (куртка, рубашка, брюки, юбка) 9. Куртка 10. Лента операционная 11. Мешок 12. Мешок для медицинских отходов 13. Наволочка 14. Накидка 15. Наматрачник 16. Наручники 17. Одеяло педиатрическое 18. Пеленка 19. Повязка 20. Пододеяльник 21. Подстилка 22. Покрывало педиатрическое 23. Ползунки 24. Полотенце (салфетка)

					25. Пинетки 26. Простыня операционная (покрытие) (400-4000)х(400-4000) мм 27. Простыня операционная (покрытие) (400-4000)х(400-4000) мм (впитывающая зона/липкий край) 28. Простыня операционная (покрытие) (400-4000)х(400-4000)мм, с отверстием (20-400)х(20-600)мм или диаметром (20-600)мм (операционная пленка/впитывающая зона/ липкий край/ мешок для сбора жидкости (фиксатор/фильтр)/ карман (фиксатор/ отвод)/ градуированная сумка (отвод)/ дополнительные вставки/ встроенные бахилы) 29. Простыня операционная (покрытие) (400-4000)х(400-4000) мм с отверстием (20-400)х(20-600) мм или диаметром (20-600) мм (липкий край/впитывающая зона/операционная пленка/напальчник/встроенные бахилы/покрытие для ног/карман/мешок/сумка градуированная/фиксатор) 30. Простыня операционная (покрытие) (400-4000)х(400-4000) мм с отверстием (20-400)х(20-600) мм или диаметром (20-600) мм (операционная пленка/карман/отвод/липкий край/фиксатор/ впитывающая зона/встроенная полусфера) 31. Распашонка 32. Рубашка 33. Рубашка для новорожденного 34. Рубашка для роженицы 35. Салфетка хирургическая 36. Тапочки 37. Трусики 38. Фартук хирургический 39. Фиксатор (держатель шнура) 40. Халат хирургический 41. Чепчик 42. Чехол 43. Чехол на оборудование 44. Чехол хирургический на инструментальный столик (100-3000)х(100-3000) мм (впитывающая зона/ липкий край/ карман/ карман с фиксатором/ откидная пеленка) 45. Чехол хирургический на инструментальный столик (100-3000)х(100-3000)х(100-3000) мм (впитывающая зона/ липкий край/ карман/ карман с фиксатором/ откидная пеленка) 46. Чулки (носки) 47. Шапочка(колпак) 48. Юбка
9.	Нетканый многослойный материал на основе	Марка: НЕОМЕД многослойная бумага НЕОМЕД по	ООО «Нео Консалтинг Групп-Инжиниринг»	(65-98) г/м ²	1. Карман-приемник 2. Коврик 3. Мешок Накидка 4. Наручники 5. Пеленка

	целлюлозы и полиэтилена	ТУ 5456-002-39902546-2016 Сырьевой состав: - полиэтилен – 45 % - целлюлоза – 55 %			6. Подстилка 7. Покрывало педиатрическое 8. Полотенце (салфетка) 9. Простыня операционная (покрытие) (400-4000)х(400-4000) мм 10. Простыня операционная (покрытие) (400-4000)х(400-4000) мм (впитывающая зона/липкий край) 11. Салфетка хирургическая 12. Фартук хирургический 13. Чехол
10.	Двусторонняя пленка на основе акрилатного сополимера на полипропиленовой основе с осветленной крафт-бумагой	Марка: лента клейкая специального назначения по ТУ 22.21.42-004-79109361-2017 Марка: DuploMed SD 6248 D Лента клейкая двухсторонняя	ООО Брендлента » Lohmann GmbH & Co. KG (Германия)	(80-100) мкм	1. Карман-приемник 2. Лента операционная 3. Мешок 4. Мешок для медицинских отходов 5. Простыня операционная (покрытие) (400-4000)х(400-4000) мм 6. Простыня операционная (покрытие) (400-4000)х(400-4000) мм (впитывающая зона/липкий край) 7. Простыня операционная (покрытие) (400-4000)х(400-4000)мм, с отверстием (20-400)х(20-600)мм или диаметром (20-600)мм (операционная пленка/впитывающая зона/ липкий край/ мешок для сбора жидкости (фиксатор/фильтр)/ карман (фиксатор/ отвод)/ градуированная сумка (отвод)/ дополнительные вставки/ встроенные бахилы) 8. Простыня операционная (покрытие) (400-4000)х(400-4000) мм с отверстием (20-400)х(20-600) мм или диаметром (20-600) мм (липкий край/впитывающая зона/операционная пленка/напальчник/встроенные бахилы/покрытие для ног/карман/мешок/сумка градуированная/фиксатор) 9. Простыня операционная (покрытие) (400-4000)х(400-4000) мм с отверстием (20-400)х(20-600) мм или диаметром (20-600) мм (операционная пленка/карман/отвод/липкий край/фиксатор/ впитывающая зона/встроенная полусфера) 10. Фиксатор (держатель шнура) 11. Чехол 12. Чехол на оборудование 13. Чехол хирургический на инструментальный столик (100-3000)х(100-3000) мм (впитывающая зона/ липкий край/ карман/ карман с фиксатором/ откидная пеленка)
11.	Разрезная прилегающая пленка с односторонним покрытием	Марка: 3М Состав: Основа - полиуретан Лайнер - бумага Клеящий слой – акрилат	3М	(30-50) мкм	1. Простыня операционная (покрытие) (400-4000)х(400-4000)мм, с отверстием (20-400)х(20-600)мм или диаметром (20-600)мм (операционная пленка/впитывающая зона/ липкий край/ мешок для сбора жидкости (фиксатор/фильтр)/ карман (фиксатор/ отвод)/ градуированная сумка (отвод)/ дополнительные вставки/ встроенные бахилы)

	3М	Lohmann GmbH & Co. KG, Германия			2. Простыня операционная (покрытие) (400-4000)×(400-4000) мм с отверстием (20-400)×(20-600) мм или диаметром (20-600) мм (липкий край/впитывающая зона/операционная пленка/напальчник/встроенные бахилы/покрытие для ног/карман/мешок/сумка градуированная/фиксатор) 3. Простыня операционная (покрытие) (400-4000)×(400-4000) мм с отверстием (20-400)×(20-600) мм или диаметром (20-600) мм (операционная пленка/карман/отвод/липкий край/фиксатор/ впитывающая зона/встроенная полусфера) 4. Пленка операционная
12.	Разрезная липкая пленка	Марка: DuploMed SUR 62400 Состав: Основа - полиуретан Лайнер - бумага Клеящий слой – акрилат	Lohmann GmbH & Co. KG, Германия	(30-50) мкм	1. Простыня операционная (покрытие) (400-4000)×(400-4000)мм, с отверстием (20-400)×(20-600)мм или диаметром (20-600)мм (операционная пленка/впитывающая зона/ липкий край/ мешок для сбора жидкости (фиксатор/фильтр)/ карман (фиксатор/ отвод)/ градуированная сумка (отвод)/ дополнительные вставки/ встроенные бахилы) 2. Простыня операционная (покрытие) (400-4000)×(400-4000) мм с отверстием (20-400)×(20-600) мм или диаметром (20-600) мм (липкий край/впитывающая зона/операционная пленка/напальчник/встроенные бахилы/покрытие для ног/карман/мешок/сумка градуированная/фиксатор) 3. Простыня операционная (покрытие) (400-4000)×(400-4000) мм с отверстием (20-400)×(20-600) мм или диаметром (20-600) мм (операционная пленка/карман/отвод/липкий край/фиксатор/ впитывающая зона/встроенная полусфера) 4. Пленка операционная
13.	Полиэтилен	Пленка полиэтиленовая по ГОСТ 10354 Состав: полиэтилен 100%	ООО «Геопласт»	(40-200) мкм	1. Бахилы 2. Карман–приемник 3. Коврик 4. Мешок 5. Мешок для медицинских отходов 6. Накидка 7. Наматрачник 8. Наручники 9. Пододеяльник 10. Простыня операционная (покрытие) (400-4000)×(400-4000) мм 11. Простыня операционная (покрытие) (400-4000)×(400-4000) мм (впитывающая зона/липкий край) 12. Простыня операционная (покрытие) (400-4000)×(400-4000)мм, с отверстием (20-400)×(20-600)мм или диаметром (20-600)мм (операционная пленка/впитывающая зона/ липкий край/ мешок для сбора жидкости (фиксатор/фильтр)/

					карман (фиксатор/ отвод)/ градуированная сумка (отвод)/ дополнительные вставки/ встроенные бахилы) 13. Простыня операционная (покрытие) (400-4000)×(400-4000) мм с отверстием (20-400)×(20-600) мм или диаметром (20-600) мм (липкий край/впитывающая зона/операционная пленка/напальчник/встроенные бахилы/покрытие для ног/карман/мешок/сумка градуированная/фиксатор) 14. Простыня операционная (покрытие) (400-4000)×(400-4000) мм с отверстием (20-400)×(20-600) мм или диаметром (20-600) мм (операционная пленка/карман/отвод/липкий край/фиксатор/ впитывающая зона/встроенная полусфера) 15. Фартук хирургический 16. Чехол 17. Чехол на оборудование 18. Чехол хирургический на инструментальный столик (100-3000)×(100-3000) мм (впитывающая зона/ липкий край/ карман/ карман с фиксатором/ откидная пеленка) 19. Чехол хирургический на инструментальный столик (100-3000)×(100-3000)×(100-3000) мм (впитывающая зона/ липкий край/ карман/ карман с фиксатором/ откидная пеленка)
14.	ПВХ	пленка ПВХ		(80-100) мкм	1. Карман-приемник 2. Коврик 3. Лента операционная 4. Мешок 5. Мешок для медицинских отходов 6. Наволочка 7. Накидка 8. Наматрачник 9. Нарукавники 10. Пододеяльник 11. Подстилка 12. Покрывало педиатрическое (500-4000)×(500-4000) мм 13. Простыня операционная (покрытие) (400-4000)×(400-4000) мм 14. Простыня операционная (покрытие) (400-4000)×(400-4000) мм (впитывающая зона/липкий край) 15. Простыня операционная (покрытие) (400-4000)×(400-4000)мм, с отверстием (20-400)×(20-600)мм или диаметром (20-600)мм (операционная пленка/ впитывающая зона/ липкий край/ мешок для сбора жидкости (фиксатор/фильтр)/ карман (фиксатор/ отвод)/ градуированная сумка (отвод)/ дополнительные вставки/ встроенные бахилы) 16. Простыня операционная (покрытие) (400-4000)×(400-4000) мм с отверстием

YIMA
BUSINESS
LIMITED
COMPANY
OF

			TACHENG CITY		(20-400)х(20-600) мм или диаметром (20-600) мм (липкий край/впитывающая зона/операционная пленка/напальчник/встроенные бахилы/покрытие для ног/карман/мешок/сумка градуированная/фиксатор) 17. Простыня операционная (покрытие) (400-4000)х(400-4000) мм с отверстием (20-400)х(20-600) мм или диаметром (20-600) мм (операционная пленка/карман/отвод/липкий край/фиксатор/ впитывающая зона/встроенная полусфера) 18. Салфетка хирургическая 19. Фартук хирургический 20. Фиксатор (держатель шнура) 21. Чехол 22. Чехол на оборудование 23. Чехол хирургический на инструментальный столик (100-3000)х(100-3000) мм (впитывающая зона/липкий край/ карман/ карман с фиксатором/ откидная пеленка) 24. Чехол хирургический на инструментальный столик (100-3000)х(100-3000)х(100-3000) мм (впитывающая зона/ липкий край/ карман/ карман с фиксатором/ откидная пеленка)
15.	Синтепон	Полотно нетканое термоскрепленное «Синтепон» по ТУ 8394-001-93082433-2015 Состав: термоскрепленное полиэфирное волокно	ООО Новосибирская промышленная компания «Созвездие Лотос»	60 г/м ²	1. Комбинезон для новорожденного 2. Конверт для новорожденного 3. Одеяло 4. Одеяло педиатрическое
16.	Марля медицинская	ГОСТ 9412 Состав: хлопок-100%	ООО «ХБК Навтекс»	(20-100) г/м ²	1. Полотенце (салфетка) 2. Салфетка хирургическая
17.	Материал на основе хлопка и полиэфир а (липа, манжеты, резинка)	Изделия текстильно-галантерейные тканые, плетеные, витые, вязанные, метражные и штучные по ГОСТ 18827 Состав: Хлопок Полиэфир Трубка манжетная по ТУ 8498-002-0113682131-2015 Нить шнуровязальная на	ООО «КЕС Тек» ООО «Альянс отечественных производителей» ООО «Компания	---	1. Бахилы 2. Брюки 3. Карман-приемник 4. Комбинезон 5. Комбинезон для новорожденного 6. Конверт для новорожденного 7. Костюм хирургический (куртка, рубашка, брюки, юбка) 8. Куртка 9. Лента операционная 10. Наволочка 11. Наматрачник 12. Нарукавники 13. Одеяло педиатрическое 14. Пинетки 15. Пододеяльник 16. Покрывало педиатрическое 17. Ползунки 18. Простыня операционная (покрытие) (400-4000)х(400-4000)мм, с отверстием (20-400)х(20-600)мм или диаметром (20-600)мм (операционная пленка/

	основе полиэфирной нити Нить латексная в текстильной оплетке по ОСТ -17-10-043-2001 Изделия галантерейные для швейного производства из синтетических нитей с маркировкой «Veritas». Застежка текстильная «лента контакт» по ГОСТ 30019.1	«Глобальный партнер» Ningo MH Industry Co., Ltd(Китай)	впитывающая зона/ липкий край/ мешок для сбора жидкости (фиксатор/фильтр)/ карман (фиксатор/ отвод)/ градуированная сумка (отвод)/ дополнительные вставки/ встроенные бахилы) 19. Простыня операционная (покрытие) (400-4000)×(400-4000) мм с отверстием (20-400)х(20-600) мм или диаметром (20-600) мм (липкий край/впитывающая зона/операционная пленка/напальчник/встроенные бахилы/покрытие для ног/карман/мешок/сумка градуированная/фиксатор) 20. Простыня операционная (покрытие) (400-4000)×(400-4000) мм с отверстием (20-400)х(20-600) мм или диаметром (20-600) мм (операционная пленка/карман/отвод/липкий край/фиксатор/ впитывающая зона/встроенная полусфера) 21. Распашонка 22. Рубашка 23. Рубашка для новорожденного 24. Рубашка для роженицы 25. Трусики 26. Фартук хирургический 27. Фиксатор (держатель шнура) 28. Халат хирургический 29. Чепчик 30. Чехол 31. Чулки (носки) 32. Шапочка (колпак) 33. Юбка
--	--	--	--

Материалы покупных компонентов представлены в таблице 5.

Таблица 5. Материалы покупных компонентов

№ п/п	Наименование компонента	Сырьевой состав	Производитель
1.	Пеленка впитывающая многослойная (400-4000)х(400-4000) мм	Верхний слой: нетканый материал на основе полипропилена. Внутренний слой: распушенная целлюлоза Нижний слой: водонепроницаемая нескользящая пленка	• ООО «АВАНГАРД» • ООО «Байкалтекстком» • Общество с ограниченной ответственностью «Интертекс» • ООО «ПАУЛЬ ХАРТМАНН» • ООО «МЕДМИЛ»
2.	Прокладка	Верхний слой: нетканый материал на основе полипропилена. Внутренний слой: распушенная целлюлоза Нижний слой: водонепроницаемая нескользящая пленка	• ООО "БЕЛЛА Восток" • ООО "ПАУЛЬ ХАРТМАНН" • ООО "Белла"

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектность должна соответствовать приведенным в таблицах 6.1 – 6.11.

Таблица 6.1 Комплект белья акушерского родового одноразового стерильного универсальный большой

№ п/п	Наименование	Кол-во
1	Комплект белья акушерского родового одноразового стерильного универсальный большой	1 уп.
1.1	Бахилы (при необходимости)	не более 20 шт.
1.2	Карман-приемник (при необходимости)	не более 10 шт.
1.3	Комбинезон (при необходимости)	не более 10 шт.
1.4	Костюм хирургический (куртка/ рубашка/ брюки/ юбка) (при необходимости)	не более 10 шт.
1.5	Куртка (при необходимости)	не более 10 шт.
1.6	Рубашка (при необходимости)	не более 10 шт.
1.7	Брюки (при необходимости)	не более 10 шт.
1.8	Юбка (при необходимости)	не более 10 шт.
1.9	Маска медицинская (при необходимости)	не более 10 шт.
1.10	Маска медицинская с защитным экраном(при необходимости)	не более 10 шт.
1.11	Мешок (при необходимости)	не более 10 шт.
1.12	Мешок для медицинских отходов (при необходимости)	не более 10 шт.
1.13	Наволочка (при необходимости)	не более 10 шт.
1.14	Накидка (при необходимости)	не более 10 шт.
1.15	Наматрачник (при необходимости)	не более 10 шт.
1.16	Нарукавники (при необходимости)	не более 20 шт.
1.17	Пеленка	не более 10 шт.
1.18	Пеленка впитывающая многослойная (при необходимости)	не более 10 шт.
1.19	Перчатки (при необходимости)	не более 20 шт.
1.20	Повязка (при необходимости)	не более 10 шт.
1.21	Пододеяльник (при необходимости)	не более 10 шт.
1.22	Подстилка (при необходимости)	не более 10 шт.
1.23	Полотенце (салфетка) (при необходимости)	не более 10 шт.
1.24	Прокладка (при необходимости)	не более 10 шт.
1.25	Простыня операционная (покрытие) (400-4000)х(400-4000) мм (при необходимости)	не более 10 шт.
1.26	Простыня операционная (покрытие) (400-4000)х(400-4000) мм (впитывающая зона/липкий край) (при необходимости)	не более 10 шт.
1.27	Рубашка для роженицы (при необходимости)	не более 10 шт.
1.28	Салфетка хирургическая	не более 10 шт.
1.29	Тапочки (при необходимости)	не более 20 шт.
1.30	Трусики (при необходимости)	не более 10 шт.
1.31	Фартук хирургический (при необходимости)	не более 10 шт.
1.32	Халат хирургический (при необходимости)	не более 10 шт.
1.33	Чулки (носки) (при необходимости)	не более 20 шт.
1.34	Чехол на оборудование (завязки/ кулиски/ липкий край/ фиксатор) (при необходимости)	не более 10 шт.
1.35	Чехол хирургический на инструментальный столик (100-3000)х(100-3000) мм (впитывающая зона/ липкий край/ карман/ карман с фиксатором/ откидная пеленка) (при необходимости)	не более 10 шт.
1.36	Чехол хирургический на инструментальный столик (100-3000)х(100-3000)х(100-3000) мм (впитывающая зона/ липкий край/ карман/ карман с фиксатором/ откидная пеленка) (при необходимости)	не более 10 шт.
1.37	Шапочка (колпак) (при необходимости)	не более 10 шт.

Таблица 6.2 Комплект белья акушерского родового одноразового стерильного

№ п/п	Наименование	Кол-во
1	Комплект белья акушерского родового одноразового стерильного	1 уп.
1.1	Бахилы (при необходимости)	не более 20 шт.
1.2	Костюм хирургический (куртка/ рубашка/ брюки/ юбка) (при необходимости)	не более 10 шт.
1.3	Куртка (при необходимости)	не более 10 шт.

1.4	Рубашка (при необходимости)	не более 10 шт.
1.5	Брюки (при необходимости)	не более 10 шт.
1.6	Юбка (при необходимости)	не более 10 шт.
1.7	Маска медицинская (при необходимости)	не более 10 шт.
1.8	Мешок для медицинских отходов (при необходимости)	не более 10 шт.
1.9	Нарукавники (при необходимости)	не более 20 шт.
1.10	Пеленка (при необходимости)	не более 10 шт.
1.11	Пеленка впитывающая многослойная (при необходимости)	не более 10 шт.
1.12	Перчатки (при необходимости)	не более 20 шт.
1.13	Полотенце (салфетка) (при необходимости)	не более 10 шт.
1.14	Прокладка (при необходимости)	не более 10 шт.
1.15	Простыня операционная (покрытие) (400-4000)х(400-4000) мм	не более 10 шт.
1.16	Простыня операционная (покрытие) (400-4000)х(400-4000) мм (впитывающая зона/липкий край) (при необходимости)	не более 10 шт.
1.17	Рубашка для роженицы (при необходимости)	не более 10 шт.
1.18	Салфетка хирургическая	не более 10 шт.
1.19	Трусики (при необходимости)	не более 10 шт.
1.20	Фартук хирургический (при необходимости)	не более 10 шт.
1.21	Халат хирургический (при необходимости)	не более 10 шт.
1.22	Чехол хирургический на инструментальный столик (100-3000)х(100-3000) мм (впитывающая зона/ липкий край/ карман/ карман с фиксатором/ откидная пеленка) (при необходимости)	не более 10 шт.
1.23	Чехол хирургический на инструментальный столик (100-3000)х(100-3000)х(100-3000) мм (впитывающая зона/ липкий край/ карман/ карман с фиксатором/ откидная пеленка) (при необходимости)	не более 20 шт.
1.24	Шапочка (колпак) (при необходимости)	не более 10 шт.
1.25	Чулки (носки) (при необходимости)	не более 20 шт.
1.26	Мешок (при необходимости)	не более 10 шт.

Таблица 6.3 Комплект для роженицы одноразовый стерильный

№ п/п	Наименование	Кол-во
1	Комплект для роженицы одноразовый стерильный	1 уп.
1.1	Бахилы (при необходимости)	не более 20 шт.
1.2	Маска медицинская	не более 10 шт.
1.3	Пеленка впитывающая многослойная (при необходимости)	не более 10 шт.
1.4	Повязка (при необходимости)	не более 10 шт.
1.5	Полотенце (салфетка) (при необходимости)	не более 10 шт.
1.6	Прокладка (при необходимости)	не более 10 шт.
1.7	Простыня операционная (покрытие) (400-4000)х(400-4000) мм (при необходимости)	не более 10 шт.
1.8	Простыня операционная (покрытие) (400-4000)х(400-4000) мм (впитывающая зона/липкий край) (при необходимости)	не более 10 шт.
1.9	Рубашка для роженицы (при необходимости)	не более 10 шт.
1.10	Салфетка хирургическая	не более 10 шт.
1.11	Тапочки (при необходимости)	не более 20 шт.
1.12	Трусики (при необходимости)	не более 10 шт.
1.13	Халат хирургический (при необходимости)	не более 10 шт.
1.14	Шапочка (колпак) (при необходимости)	не более 10 шт.
1.15	Чулки (носки) (при необходимости)	не более 20 шт.

Таблица 6.4 Комплект для новорожденного одноразовый стерильный

№ п/п	Наименование	Кол-во
1	Комплект для новорожденного одноразовый стерильный	1 уп.
1.1	Бирка (медальон) для новорожденного (при необходимости)	не более 10 шт.
1.2	Браслет для новорожденного (при необходимости)	не более 10 шт.
1.3	Зажим для пуповины (при необходимости)	не более 10 шт.
1.4	Комбинезон для новорожденного (при необходимости)	не более 10 шт.

1.5	Конверт для новорожденного (при необходимости)	не более 10 шт.
1.6	Одеяло педиатрическое (при необходимости)	не более 10 шт.
1.7	Пеленка (при необходимости)	не более 10 шт.
1.8	Пеленка впитывающая многослойная (при необходимости)	не более 10 шт.
1.9	Пинетки (при необходимости)	не более 20 шт.
1.10	Покрывало педиатрическое (при необходимости)	не более 10 шт.
1.11	Ползунки (при необходимости)	не более 10 шт.
1.12	Полотенце (салфетка)	не более 10 шт.
1.13	Простыня операционная (покрытие) (400-4000)х(400-4000) мм	не более 10 шт.
1.14	Распашонка (при необходимости)	не более 10 шт.
1.15	Рубашка для новорожденного (при необходимости)	не более 10 шт.
1.16	Салфетка хирургическая (при необходимости)	не более 10 шт.
1.17	Чепчик (при необходимости)	не более 10 шт.

Таблица 6.5 Комплект белья акушерского для кесарева сечения одноразовый стерильный

№ п/п	Наименование	Кол-во
1	Комплект белья акушерского для кесарева сечения одноразовый стерильный	1 уп.
1.1	Бахилы (при необходимости)	не более 20 шт.
1.2	Карман-приемник (при необходимости)	не более 10 шт.
1.3	Комбинезон (при необходимости)	не более 10 шт.
1.4	Костюм хирургический (куртка/ рубашка/ брюки/ юбка) (при необходимости)	не более 10 шт.
1.5	Лента операционная (при необходимости)	не более 10 шт.
1.6	Маска медицинская (при необходимости)	не более 10 шт.
1.7	Маска медицинская с защитным экраном (при необходимости)	не более 10 шт.
1.8	Мешок для медицинских отходов (при необходимости)	не более 10 шт.
1.9	Наволочка (при необходимости)	не более 10 шт.
1.10	Наматрачник (при необходимости)	не более 10 шт.
1.11	Нарукавники (при необходимости)	не более 10 шт.
1.12	Пеленка (при необходимости)	не более 10 шт.
1.13	Пеленка впитывающая многослойная (400-4000)х(400-4000) мм (при необходимости)	не более 10 шт.
1.14	Перчатки (при необходимости)	не более 20 шт.
1.15	Пленка операционная (при необходимости)	не более 10 шт.
1.16	Повязка (при необходимости)	не более 10 шт.
1.17	Пододеяльник (при необходимости)	не более 10 шт.
1.18	Подстилка (при необходимости)	не более 10 шт.
1.19	Полотенце (салфетка) (при необходимости)	не более 10 шт.
1.20	Прокладка (при необходимости)	не более 10 шт.
1.21	Простыня операционная (покрытие) (400-4000)х(400-4000) мм	не более 10 шт.
1.22	Простыня операционная (покрытие) (400-4000)х(400-4000) мм (впитывающая зона/ липкий край) (при необходимости)	не более 10 шт.
1.23	Простыня операционная (покрытие) (400-4000)х(400-4000)мм, с отверстием (20-400)х(20-600)мм или диаметром (20-600)мм (операционная пленка/ впитывающая зона/ липкий край/ мешок для сбора жидкости (фиксатор/фильтр)/ карман (фиксатор/ отвод)/ градуированная сумка (отвод)/ дополнительные вставки/ встроенные бахилы) (при необходимости)	не более 10 шт.
1.24	Салфетка хирургическая	не более 10 шт.
1.25	Фартук хирургический (при необходимости)	не более 10 шт.
1.26	Фиксатор (держатель шнура) (при необходимости)	не более 10 шт.
1.27	Халат хирургический (при необходимости)	не более 10 шт.
1.28	Чехол (при необходимости)	не более 10 шт.
1.29	Чехол на оборудование (завязки/ кулиски/ липкий край/ фиксатор) (при необходимости)	не более 10 шт.
1.30	Чехол хирургический на инструментальный столик (100-3000)х(100-3000) мм (впитывающая зона/ липкий край/ карман/ карман с фиксатором/ откидная пеленка) (при необходимости)	не более 10 шт.
1.31	Чехол хирургический на инструментальный столик (100-3000)х(100-3000)х(100-3000) мм (впитывающая зона/ липкий край/ карман/ карман с фиксатором/ откидная пеленка) (при необходимости)	не более 10 шт.
1.32	Чулки (носки) (при необходимости)	не более 20 шт.

1.33	Шапочка (колпак) (при необходимости)	не более 10 шт.
1.34	Мешок (при необходимости)	не более 10 шт.

Таблица 6.6 Комплект белья для гинекологических операций универсальный большой одноразовый стерильный

№ п/п	Наименование	Кол-во
1	Комплект белья для гинекологических операций универсальный большой одноразовый стерильный	1 уп.
1.1	Бахилы (при необходимости)	не более 10 шт.
1.2	Зеркало по Куско (при необходимости)	не более 10 шт.
1.3	Комбинезон (при необходимости)	не более 10 шт.
1.4	Костюм хирургический (куртка/ рубашка/ брюки/ юбка) (при необходимости)	не более 10 шт.
1.5	Лента операционная (при необходимости)	не более 10 шт.
1.6	Маска медицинская (при необходимости)	не более 10 шт.
1.7	Маска медицинская с экраном (при необходимости)	не более 10 шт.
1.8	Мешок для медицинских отходов (при необходимости)	не более 10 шт.
1.9	Нарукавники (при необходимости)	не более 10 шт.
1.10	Пеленка (при необходимости)	не более 10 шт.
1.11	Пеленка впитывающая многослойная (при необходимости)	не более 10 шт.
1.12	Перчатки (при необходимости)	не более 10 шт.
1.13	Повязка (при необходимости)	не более 10 шт.
1.14	Подстилка (при необходимости)	не более 10 шт.
1.15	Полотенце (салфетка) (при необходимости)	не более 10 шт.
1.16	Прокладка (при необходимости)	не более 10 шт.
1.17	Простыня операционная (покрытие) (400-4000)х(400-4000) мм (впитывающая зона/ липкий край)	не более 10 шт.
1.18	Простыня операционная (покрытие) (400-4000)х(400-4000) мм с отверстием (20-400)х(20-600) мм или диаметром (20-600) мм (липкий край/впитывающая зона/операционная пленка/напальчник/встроенные бахилы/покрытие для ног/карман/мешок/сумка градуированная/фиксатор) (при необходимости)	не более 10 шт.
1.19	Простыня операционная (покрытие) (400-4000)х(400-4000) мм с отверстием (20-400)х(20-600) мм или диаметром (20-600) мм (операционная пленка/карман/отвод/липкий край/фиксатор/ впитывающая зона/встроенная полусфера) (при необходимости)	не более 10 шт.
1.20	Рубашка для роженицы (при необходимости)	не более 10 шт.
1.21	Салфетка хирургическая	не более 10 шт.
1.22	Тапочки (при необходимости)	не более 10 шт.
1.23	Трусики (при необходимости)	не более 10 шт.
1.24	Фартук хирургический (при необходимости)	не более 10 шт.
1.25	Фиксатор (держатель шнура) (при необходимости)	не более 10 шт.
1.26	Халат хирургический (при необходимости)	не более 10 шт.
1.27	Чехол на оборудование (завязки/ кулилка/ липкий край/ фиксатор) (при необходимости)	не более 10 шт.
1.28	Чехол хирургический на инструментальный столик (100-3000)х(100-3000) мм (впитывающая зона/ липкий край/ карман/ карман с фиксатором/ откидная пеленка) (при необходимости)	не более 10 шт.
1.29	Чехол хирургический на инструментальный столик (100-3000)х(100-3000)х(100-3000) мм (впитывающая зона/ липкий край/ карман/ карман с фиксатором/ откидная пеленка) (при необходимости)	не более 10 шт.
1.30	Чулки (носки) (при необходимости)	не более 20 шт.
1.31	Шапочка (колпак) (при необходимости)	не более 10 шт.
1.32	Мешок (липкий край) (при необходимости)	не более 10 шт.

Таблица 6.7 Комплект белья операционного одноразового стерильного для гинекологических операций

№ п/п	Наименование	Кол-во
1	Комплект белья операционного одноразового стерильного для гинекологических операций	1 уп.
1.1	Бахилы (при необходимости)	не более 10 шт.
1.2	Зеркало по Куско (при необходимости)	не более 10 шт.
1.3	Комбинезон (при необходимости)	не более 10 шт.

1.4	Костюм хирургический (куртка/ рубашка/ брюки/ юбка) (при необходимости)	не более 10 шт.
1.5	Лента операционная (при необходимости)	не более 10 шт.
1.6	Маска медицинская (при необходимости)	не более 10 шт.
1.7	Маска медицинская с экраном (при необходимости)	не более 10 шт.
1.8	Мешок для медицинских отходов (при необходимости)	не более 10 шт.
1.9	Нарукавники (при необходимости)	не более 10 шт.
1.10	Пеленка впитывающая многослойная (при необходимости)	не более 10 шт.
1.11	Перчатки (при необходимости)	не более 10 шт.
1.12	Пленка операционная (при необходимости)	не более 10 шт.
1.13	Повязка (при необходимости)	не более 10 шт.
1.14	Полотенце (салфетка) (при необходимости)	не более 10 шт.
1.15	Прокладка (при необходимости)	не более 10 шт.
1.16	Простыня операционная (покрытие) (400-4000)х(400-4000) мм с отверстием (20-400)х(20-600) мм или диаметром (20-600) мм (липкий край/впитывающая зона/операционная пленка/напальчник/встроенные бахилы/покрытие для ног/карман/мешок/сумка градуированная/фиксатор) (при необходимости)	не более 10 шт.
1.17	Простыня операционная (покрытие) (400-4000)х(400-4000) мм (впитывающая зона/липкий край)	не более 10 шт.
1.18	Простыня операционная (покрытие) (400-4000)х(400-4000)мм, с отверстием (20-400)х(20-600)мм или диаметром (20-600)мм (операционная пленка/ впитывающая зона/ липкий край/ мешок для сбора жидкости (фиксатор/фильтр)/ карман (фиксатор/ отвод)/ градуированная сумка (отвод)/ дополнительные вставки/ встроенные бахилы) (при необходимости)	не более 10 шт.
1.19	Рубашка для роженицы (при необходимости)	не более 10 шт.
1.20	Салфетка хирургическая	не более 10 шт.
1.21	Тапочки (при необходимости)	не более 10 шт.
1.22	Трусики (при необходимости)	не более 10 шт.
1.23	Фартук хирургический (при необходимости)	не более 10 шт.
1.24	Фиксатор (держатель шнура) (при необходимости)	не более 10 шт.
1.25	Халат хирургический (при необходимости)	не более 10 шт.
1.26	Чехол на оборудование (завязки/ кулиски/ липкий край/ фиксатор) (при необходимости)	не более 10 шт.
1.27	Чехол хирургический на инструментальный столик (100-3000)х(100-3000) мм (впитывающая зона/ липкий край/ карман/ карман с фиксатором/ откидная пеленка) (при необходимости)	не более 10 шт.
1.28	Чехол хирургический на инструментальный столик (100-3000)х(100-3000)х(100-3000) мм (впитывающая зона/ липкий край/ карман/ карман с фиксатором/ откидная пеленка) (при необходимости)	не более 10 шт.
1.29	Чулки (носки) (при необходимости)	не более 20 шт.
1.30	Шапочка (колпак) (при необходимости)	не более 10 шт.

Таблица 6.8 Комплект белья хирургического на аппаратуру одноразовый стерильный

№ п/п	Наименование	Кол-во
1	Комплект белья хирургического на аппаратуру одноразовый стерильный	1 уп.
1.1	Коврик (при необходимости)	не более 10 шт.
1.2	Мешок (при необходимости)	не более 10 шт.
1.3	Простыня операционная (покрытие) (400-4000)х(400-4000) мм (впитывающая зона/липкий край)	не более 10 шт.
1.4	Салфетка хирургическая	не более 20 шт.
1.5	Чехол (при необходимости)	не более 10 шт.
1.6	Чехол на оборудование (завязки/ кулиски/ липкий край/ фиксатор) (при необходимости)	не более 10 шт.

Таблица 6.9 Комплект белья для гинекологических осмотров, для УЗИ одноразовый стерильный

№ п/п	Наименование	Кол-во
1	Комплект белья для гинекологических осмотров, для УЗИ одноразовый стерильный	1 уп.
1.1	Бахилы	не более 10 шт.
1.2	Зеркало по Куско (при необходимости)	не более 10 шт.

1.3	Ложка Фолькмана (при необходимости)	не более 10 шт.
1.4	Маска медицинская (при необходимости)	не более 10 шт.
1.5	Мешок для медицинских отходов (при необходимости)	не более 4 шт.
1.6	Пеленка (при необходимости)	не более 10 шт.
1.7	Пеленка впитывающая многослойная (при необходимости)	не более 10 шт.
1.8	Перчатки (при необходимости)	не более 10 шт.
1.9	Подстилка (при необходимости)	не более 10 шт.
1.10	Полотенце (салфетка) (при необходимости)	не более 20 шт.
1.11	Презерватив (при необходимости)	не более 10 шт.
1.12	Простыня операционная (покрытие) (400-4000)х(400-4000) мм (впитывающая зона/липкий край) (при необходимости)	не более 10 шт.
1.13	Салфетка хирургическая	не более 10 шт.
1.14	Тапочки (при необходимости)	не более 20 шт.
1.15	Цитошетка (при необходимости)	не более 10 шт.
1.16	Чулки (носки) (при необходимости)	не более 20 шт.
1.17	Шапочка (колпак) (при необходимости)	не более 10 шт.
1.18	Шпатель (при необходимости)	не более 10 шт.
1.19	Шпатель Эйра (при необходимости)	не более 10 шт.

Таблица 6.10 Комплект белья послеоперационного одноразовый стерильный

№ п/п	Наименование	Кол-во
1	Комплект белья послеоперационного одноразовый стерильный	1 уп.
1.1	Бахилы (при необходимости)	не более 20 шт.
1.2	Костюм хирургический (куртка/ рубашка/ брюки/ юбка) (при необходимости)	не более 10 шт.
1.3	Маска медицинская (при необходимости)	не более 10 шт.
1.4	Мешок для медицинских отходов (при необходимости)	не более 10 шт.
1.5	Наволочка (при необходимости)	не более 10 шт.
1.6	Наматрачник (при необходимости)	не более 10 шт.
1.7	Пеленка впитывающая многослойная (при необходимости)	не более 10 шт.
1.8	Пододеяльник (при необходимости)	не более 10 шт.
1.9	Полотенце (салфетка)	не более 10 шт.
1.10	Простыня операционная (покрытие) (400-4000)х(400-4000) мм	не более 10 шт.
1.11	Трусики (при необходимости)	не более 10 шт.
1.12	Халат хирургический (при необходимости)	не более 10 шт.
1.13	Чулки (носки) (при необходимости)	не более 20 шт.
1.14	Шапочка (колпак) (при необходимости)	не более 10 шт.

Таблица 6.11 Комплект белья операционного одноразового стерильного для покрытия операционного стола

№ п/п	Наименование	Кол-во
1	Комплект белья операционного одноразового стерильного для покрытия операционного стола	1 уп.
1.1	Карман-приемник (при необходимости)	не более 10 шт.
1.2	Мешок для медицинских отходов (при необходимости)	не более 10 шт.
1.3	Простыня операционная (покрытие) (400-4000)х(400-4000) мм	не более 10 шт.
1.4	Салфетка хирургическая	не более 10 шт.
1.5	Чехол на оборудование (завязки/ кулиски/ липкий край/ фиксатор) (при необходимости)	не более 10 шт.
1.6	Чехол хирургический на инструментальный столик (100-3000)х(100-3000) мм (впитывающая зона/ липкий край/ карман/ карман с фиксатором/ откидная пеленка) (при необходимости)	не более 10 шт.
1.7	Чехол хирургический на инструментальный столик (100-3000)х(100-3000)х(100-3000) мм (впитывающая зона/ липкий край/ карман/ карман с фиксатором/ откидная пеленка) (при необходимости)	не более 10 шт.

5. СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Изделие в упаковке стерилизовано радиационным способом по ГОСТ ISO 11137-1-2011 при стерилизующей дозе, составляющей 20 ± 5 кГр (максимально допустимая доза – 55 кГр). Процесс стерилизации валидирован и подвергается текущему контролю.

6. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВНИМАНИЕ! Перед использованием необходимо осмотреть упаковку Изделия на отсутствие механических повреждений и убедиться в ее целостности. Запрещается использовать Изделие, если нарушена целостность его упаковки.

ВНИМАНИЕ! Изделие предназначено для однократного применения. Повторное использование запрещается!

7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

7.1 Транспортирование

Изделие в упаковке и в транспортной таре следует транспортировать в крытых транспортных средствах транспортом любого вида в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

Условия транспортирования Изделия в упаковке и транспортной таре – при температуре от минус 50°C до плюс 50°C и относительной влажности не более 80%.

При транспортировании транспортные тары с Изделиями должны быть закреплены таким образом, чтобы исключить возможность их самопроизвольного перемещения и соударения друг с другом и с бортами транспортного средства.

При погрузке, выгрузке и транспортировании Изделия должны быть приняты меры, предохраняющие его и транспортную тару от загрязнения, повреждения и попадания влаги.

7.2 Хранение

Хранение Изделий у изготовителя и потребителя должно осуществляться в групповой упаковке либо транспортной таре – при температуре от плюс 5°C до плюс 40°C и относительной влажности не более 80%. Изделия должны храниться в сухих проветриваемых помещениях на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов и должны быть защищены от солнечных лучей и атмосферных воздействий.

8. УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация изделия осуществляется с отходами класса Б в соответствии с действующим законодательством РФ на момент утилизации.

9. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие Изделия требованиям ТУ 32.50.50-016-70516780-2021 при соблюдении указаний по транспортированию, хранению и применению.

Гарантийный срок хранения Изделия в упаковке предприятия-изготовителя – 5 лет с даты изготовления. При наличии в комплекте поставки покупных стерильных медицинских изделий срок хранения комплекта может быть сокращен до срока годности покупных изделий.

10. РЕКЛАМАЦИИ

Запросы любого рода и рекламации следует направлять в ООО «Здравмедтех-Н» по адресу: 630091, Новосибирская область, г.о. город Новосибирск, г. Новосибирск, ул. Советская 64/1, оф. 607, тел.: 209-22-30, e-mail: Info@zmt-nsk.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕНЯЕМЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ

Обозначение	Наименование документа
ГОСТ 31508-2012	Изделия медицинские. Классификация в зависимости от потенциального риска применения. Общие требования
ГОСТ ISO 10993-1-2011	Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования
ГОСТ ISO 10993-5-2011	Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro
ГОСТ ISO 10993-10-2011	Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия
ГОСТ EN 13795-3-2011	Хирургическая одежда и белье, применяемые как медицинские изделия для пациентов, хирургического персонала и оборудования. Часть 3. Требования к исполнению и уровни исполнения
ГОСТ ISO 11607-1-2018	Упаковка для медицинских изделий, подлежащих финишной стерилизации. Часть 1. Требования к материалам, барьерным системам для стерилизации и упаковочным системам
ГОСТ ISO 11607-2-2018	Упаковка для медицинских изделий, подлежащих финишной стерилизации. Часть 2. Требования к валидации процессов формирования, герметизации и сборки
ГОСТ ISO 11137-1-2011	Стерилизация медицинской продукции. Радиационная стерилизация. Часть 1. Требования к разработке, валидации и текущему контролю процесса стерилизации медицинских изделий
ГОСТ Р 52770-2016	Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний
ГОСТ Р ИСО 15223-1-2020	Изделия медицинские. Символы, применяемые при маркировании на медицинских изделиях, этикетках и в сопроводительной документации. Часть 1. Основные требования

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ВНЕШНИЙ ВИД И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ



Рис. 1а – Бахилы. *Вариант исполнения: Бахилы на ступню (носки) (200-500)мм с шагом 5 мм*

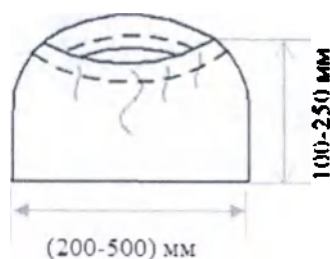


Рис. 1б – Бахилы. *Вариант исполнения: Бахилы полиэтиленовые (200-500)мм с шагом 5 мм*

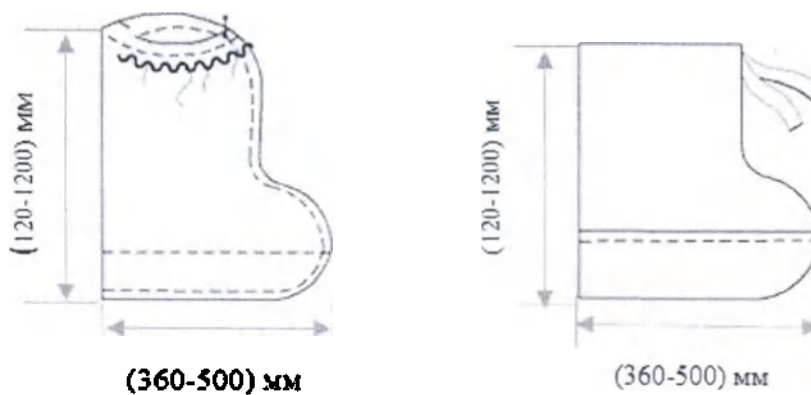


Рис. 1в – Бахилы. *Вариант исполнения: Бахилы хирургические высокие (360-500)мм с шагом 5 мм (с резинкой или с завязками)*

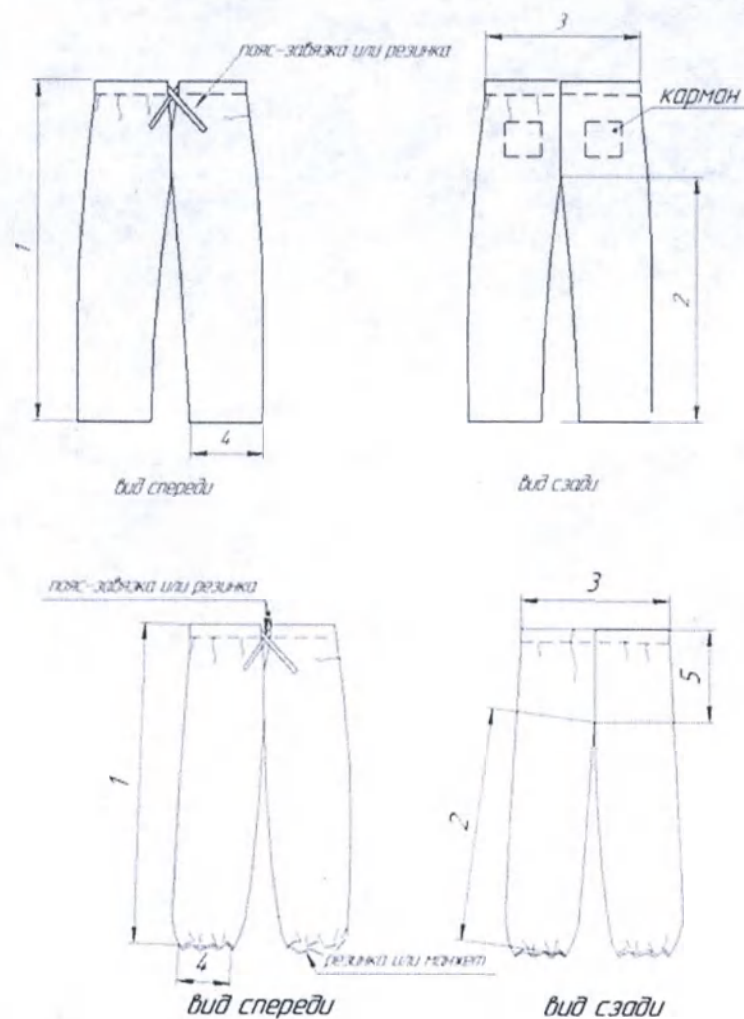


Рис. 2 – Брюки (размеры 40-42, 44-48, 50-54, 56-60, 62-66, 68-72, 74-76, длина 900-1200 мм с шагом 5 мм, пояс на резинке или на завязках, низ прямой или на резинке или на манжете, с карманами или без карманов)

Обозначение	Наименование измерения	Размер							Допуск, %
		40-42	44-48	50-54	56-60	62-66	68-72	74-76	
1	Длина изделия по боковому шву, мм	900-1200							± 10
2	Длина изделия по шаговому шву, мм	700-900							± 10
3	Ширина изделия на уровне талии, мм(ПО)	520	600	640	720	760	800	840	± 5
4	Ширина брюк внизу, мм (ПО)	210	240	250	280	300	340	380	± 5
5	Высота сидения, мм	250	280	350	370	380	400	450	± 10

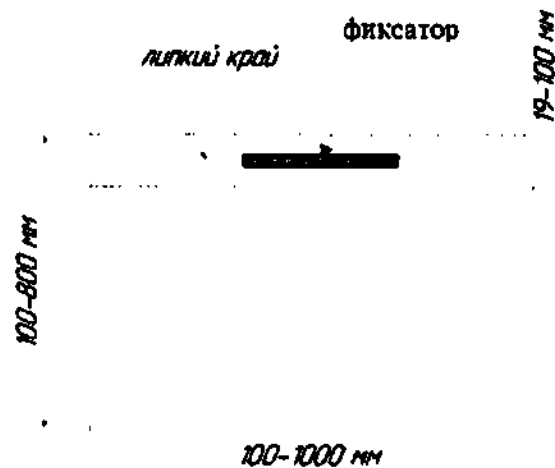


Рис. 3 – Карман-приемник (липкий край/фиксатор) (100-800)х(100-1000) мм с шагом 5 мм

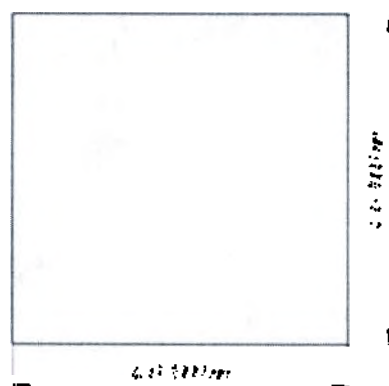


Рис. 4 – Коврик (400-1000)х(400-1000) мм с шагом 5 мм

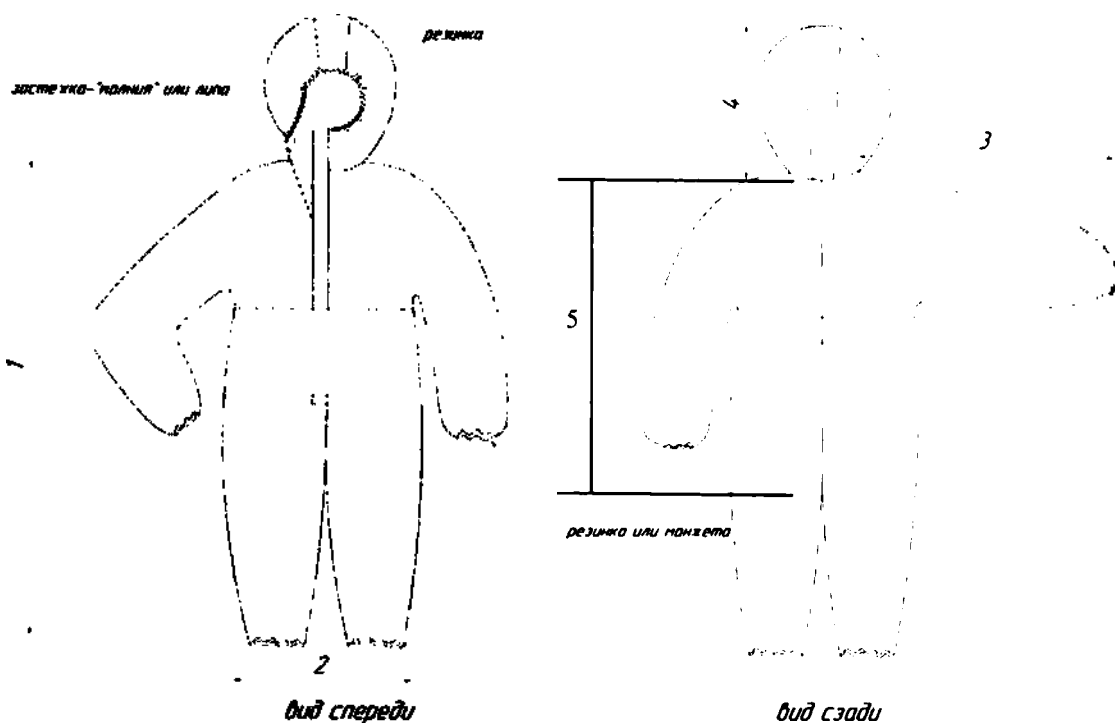


Рис. 5а – Комбинезон. *Вариант исполнения:* Комбинезон (размеры 44-48, 50-54, 56-60, 62-66, 68-72, 74-76, длина 1500-2000 мм с шагом 5 мм, рукава на резинке или на манжете, низ брюк на резинке или на манжете, застежка молния или липа)

Обозначение	Наименование измерения	Размер						Допуск, %
		44-48	50-54	56-60	62-66	68-72	74-76	
1	Длина изделия, мм	1500-2000						± 10
2	Ширина изделия на уровне талии (по шву притачивания верхней части изделия к нижней), мм	640	690	740	790	840	890	± 5
3	Длина рукава+длина плеча, мм	880	880	900	910	930	930	± 10
4	Высота капюшона, мм	360-460						±10
5	Длина от шейной точки до подъягодичной складки, мм	950	1000	1050	1050	1050	1100	± 10

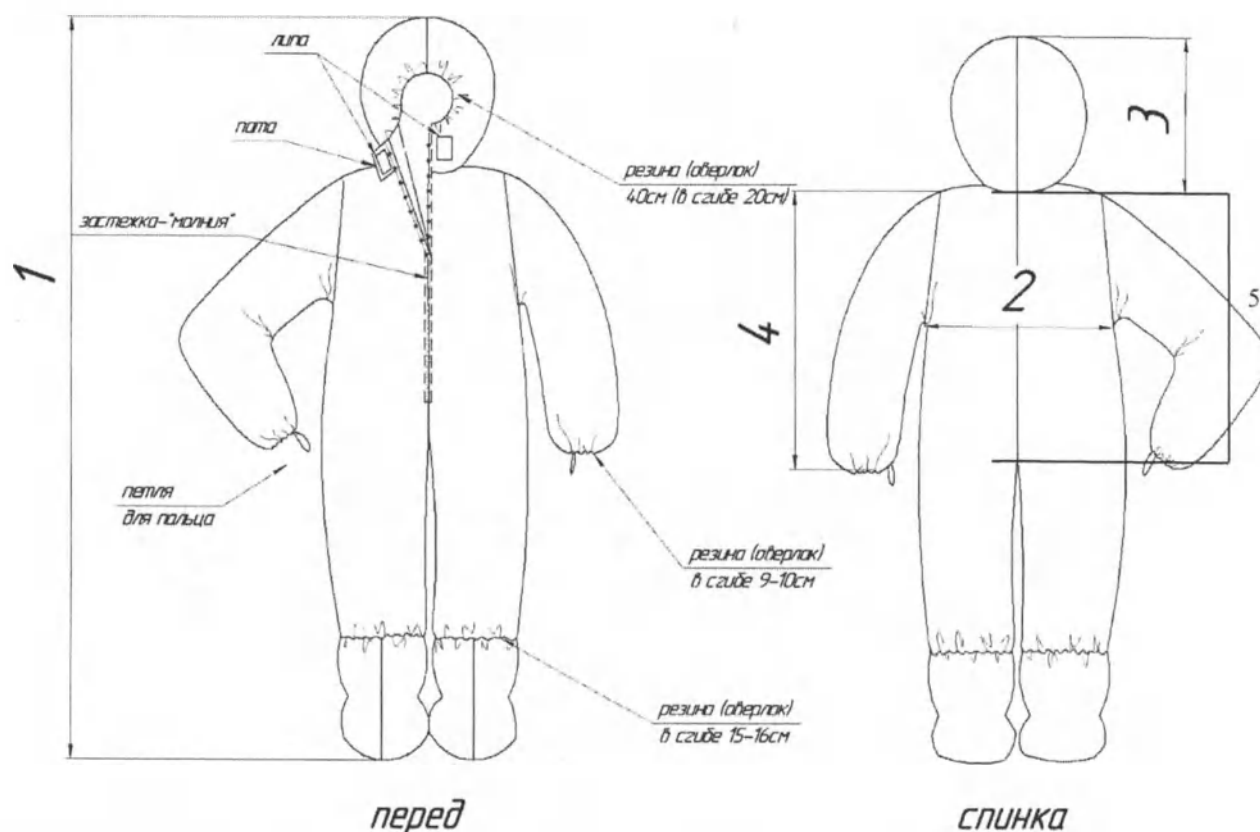


Рис. 5б – Комбинезон. Вариант исполнения: Комбинезон (размеры 46-48, 50-52, 54-56, 58-60, 62-64, 68-72, 74-76, длина 1780-2500 мм с шагом 5 мм, рукава на резинке или на манжете, застежка молния или липа, встроенные бахилы)

Обозначение	Наименование измерения	Размер						Допуск, %
		44-48	50-52	54-56	58-60	62-64	68-72	
1	Длина изделия, мм	1780 - 2500						± 10
2	Ширина изделия на уровне глубины проймы (ПО), мм	630	670	710	750	800	850	± 5
3	Высота капюшона, мм	390						± 10
4	Длина рукава, мм	500-600						± 10

5	Длина от шейной точки до подъягодичной складки, мм	950	1000	1050	1050	1050	1100	1100	± 10
---	--	-----	------	------	------	------	------	------	----------

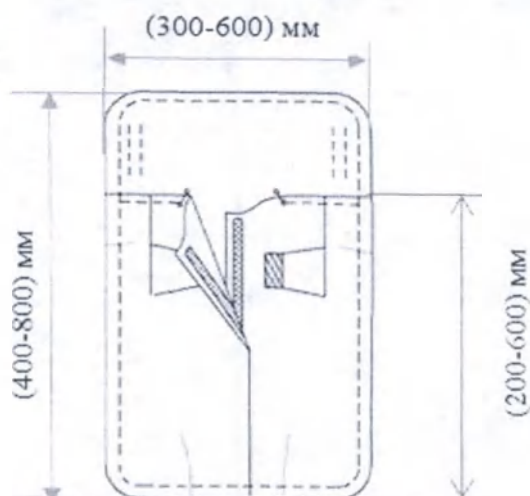


Рис. 6 – Комбинезон для новорожденного (300-600)х(400-800) мм с шагом 5 мм

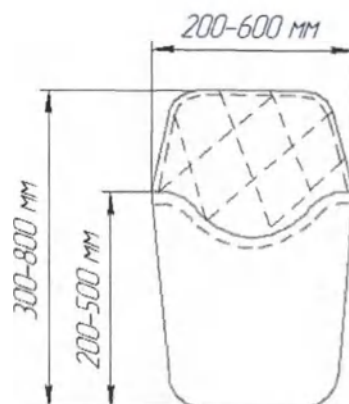


Рис. 7 – Конверт для новорожденного (200-600)х(300-800) мм с шагом 5 мм

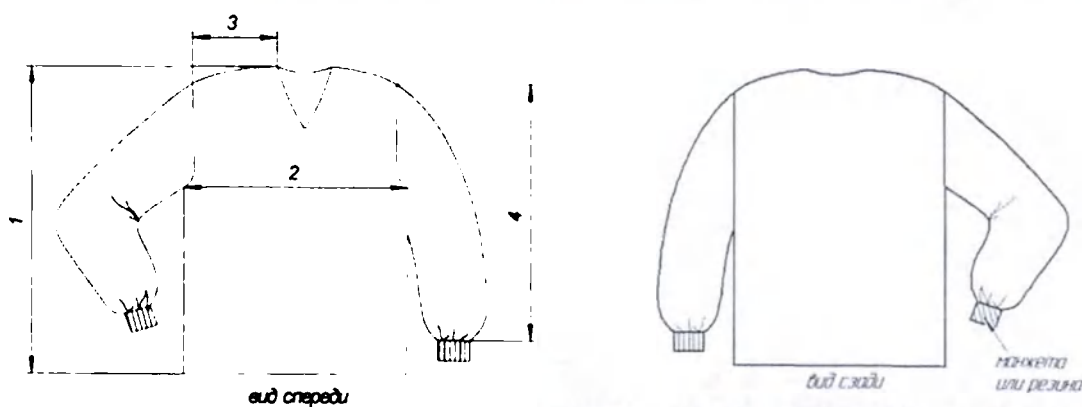


Рис. 8а – Куртка. Вариант исполнения: Куртка (размеры 40-42, 44-48, 50-54, 56-60, 62-66, 68-72, 74-76, рукава на резинке или на манжете, с карманами или без карманов)

Обозначение	Наименование измерения	Размер							Допуск, %
		40-42	44-48	50-54	56-60	62-66	68-72	74-76	
1	Длина изделия, мм	720	750	770	790	810	880	940	± 10
2	Ширина изделия на уровне проймы, мм	610	640	700	750	820	870	920	± 10

3	Ширина плеча, мм	200	230	250	270	300	310	320	± 10
4	Длина рукава, мм	200-530	200-550	200-560	200-570	200-600	200-600	200-600	± 10



Рис. 8б – Куртка. *Вариант исполнения:* Куртка «Евростандарт» (размеры 40-42, 44-48, 50-54, 56-60, 62-66, 68-72, 74-76, цельнокроеный рукав, с карманами или без карманов)

Обозначение	Наименование измерения	Размер							Допуск, %
		40-42	44-48	50-54	56-60	62-66	68-72	74-76	
1	Длина изделия, мм	700	740	760	780	800	830	960	± 10
2	Ширина изделия внизу, мм	550	620	680	740	800	860	930	± 5
3	Ширина плеча, мм	250	280	310	320	360	380	410	± 5

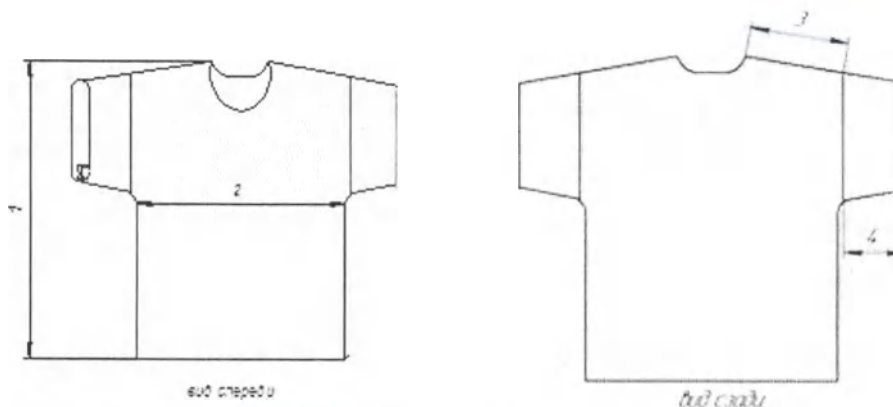


Рис. 8в – Рубашка (размеры 40-42, 44-48, 50-54, 56-60, 62-66, 68-72, 74-76, втачной рукав)

Обозначение	Наименование измерения	Размер							Допуск, %
		40-42	44-48	50-54	56-60	62-66	68-72	74-76	
1	Длина изделия, мм	750-810	770-830	790-850	810-870	830-890	850-910	850-910	± 10
2	Ширина изделия на уровне глубины проймы, мм	565	625	685	745	805	865	925	± 5
3	Ширина плеча, мм	200	225	250	275	300	325	350	± 5
4	Длина рукава, мм	100-200							± 5

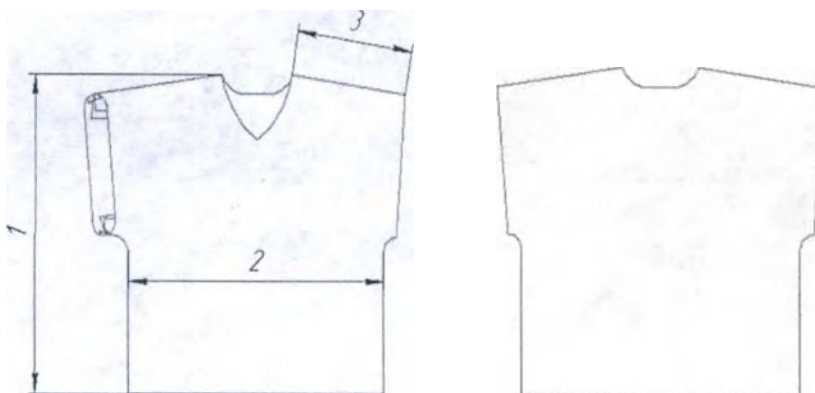


Рис. 8г – Рубашка (размеры 40-42, 44-48, 50-54, 56-60, 62-66, 68-72, 74-76, цельнокроеный рукав)

Обозначение	Наименование измерения	Размер							
		40-42	44-48	50-54	56-60	62-66	68-72	74-76	Допуск, %
1	Длина изделия, мм	700	740	760	780	800	830	960	± 10
2	Ширина изделия внизу, мм	550	620	680	740	800	860	930	± 5
3	Ширина плеча, мм	250	280	310	320	360	380	410	± 5

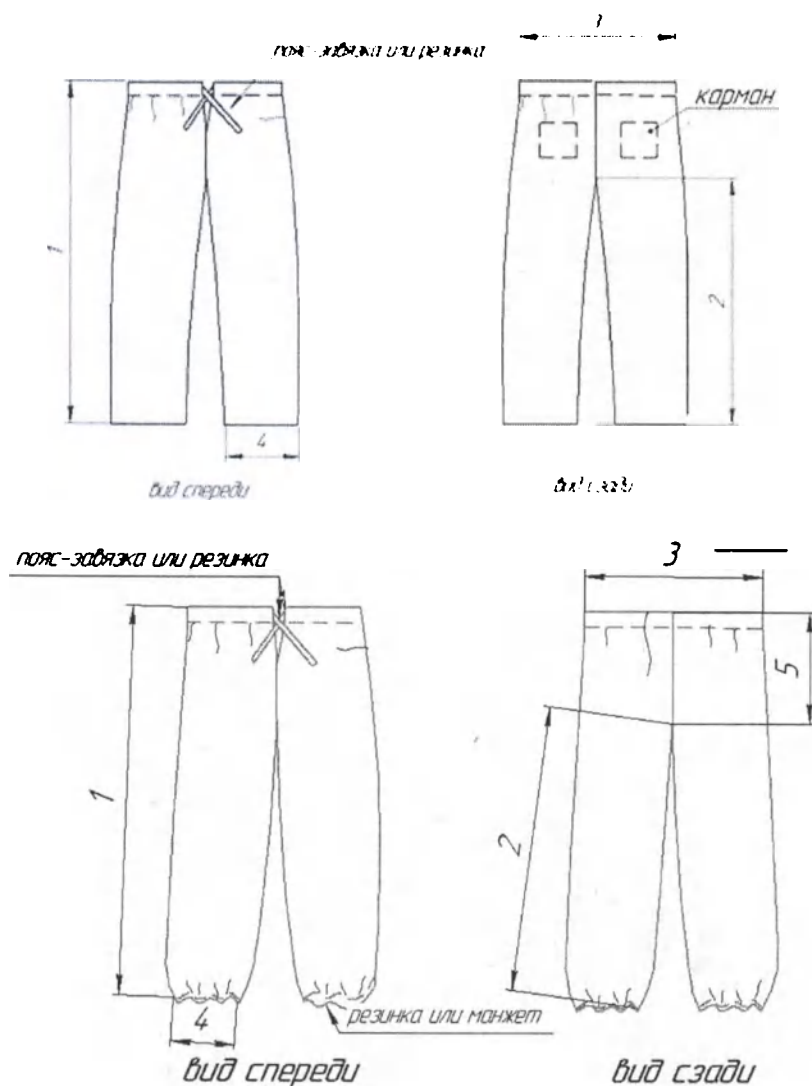


Рис. 8д – Брюки (размеры 40-42, 44-48, 50-54, 56-60, 62-66, 68-72, 74-76, длина 900-1200 мм с шагом 5 мм, пояс на резинке или на завязках, низ прямой или на резинке или на манжете, с карманами или без карманов)

Обозначение	Наименование измерения	Размер							Допуск, %
		40-42	44-48	50-54	56-60	62-66	68-72	74-76	
1	Длина изделия по боковому шву, мм	900-1200							± 10
2	Длина изделия по шаговому шву, мм	700-900							± 10
3	Ширина изделия на уровне талии, мм (ПО)	520	600	640	720	760	800	840	± 5
4	Ширина брюк внизу, мм (ПО)	210	240	250	280	300	340	380	± 5
5	Высота сидения, мм	250	280	350	370	380	400	450	± 10

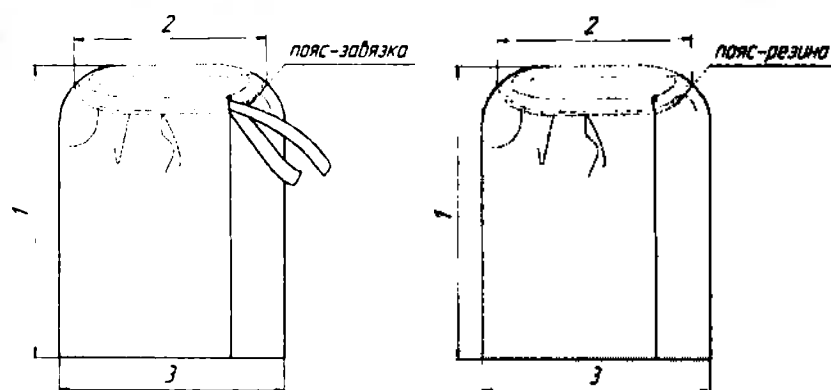


Рис. 8е – Юбка (размеры 40-42, 44-48, 50-54, 56-60, 62-66, 68-72, 74-76, пояс на резинке или на завязках)

Обозначение	Наименование измерения	Размер							Допуск, %
		40-42	44-48	50-54	56-60	62-66	68-72	74-76	
1	Длина изделия по боковому шву, мм	500	600	700	700	800	800	1000	± 5
2	Ширина изделия на уровне талии, мм	450	500	600	700	800	900	900	± 5
3	Ширина изделия по низу, мм	450	500	600	700	800	900	900	± 5

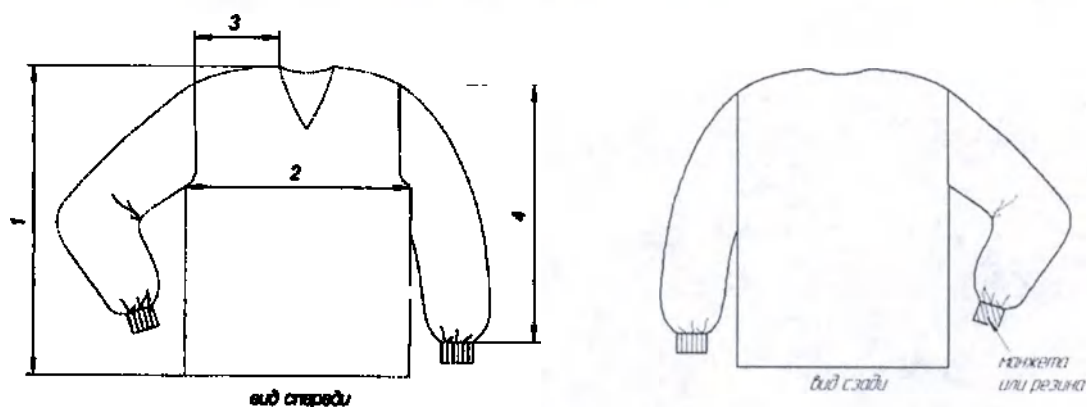


Рис. 9а – Куртка. *Вариант исполнения:* Куртка (размеры 40-42, 44-48, 50-54, 56-60, 62-66, 68-72, 74-76, рукава на резинке или на манжете, с карманами или без карманов)

Обозначение	Наименование измерения	Размер							
		40-42	44-48	50-54	56-60	62-66	68-72	74-76	Допуск, %
1	Длина изделия, мм	720	750	770	790	810	880	940	± 10
2	Ширина изделия на уровне проймы, мм	610	640	700	750	820	870	920	± 10
3	Ширина плеча, мм	200	230	250	270	300	310	320	± 10
4	Длина рукава, мм	200-530	200-550	200-560	200-570	200-600	200-600	200-600	± 10

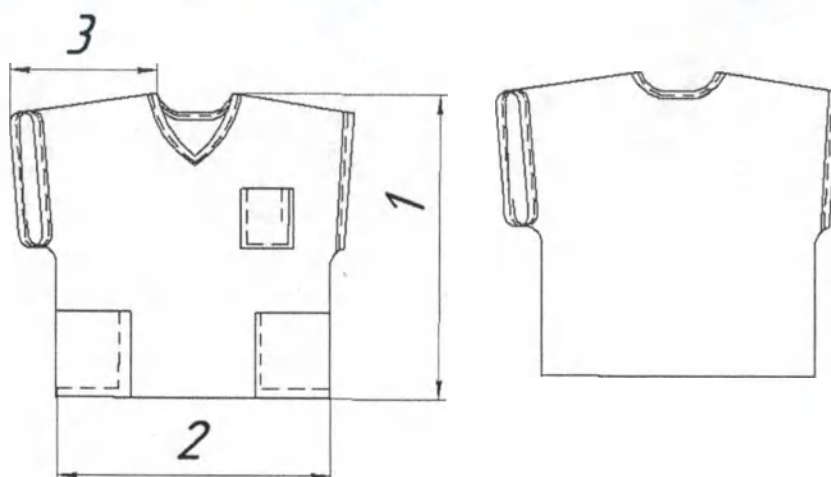


Рис. 9б – Куртка. *Вариант исполнения:* Куртка «Евростандарт» (размеры 40-42, 44-48, 50-54, 56-60, 62-66, 68-72, 74-76, цельнокроеный рукав, с карманами или без карманов)

Обозначение	Наименование измерения	Размер							
		40-42	44-48	50-54	56-60	62-66	68-72	74-76	Допуск, %
1	Длина изделия, мм	700	740	760	780	800	830	960	± 10
2	Ширина изделия внизу, мм	550	620	680	740	800	860	930	± 5
3	Ширина плеча, мм	250	280	310	320	360	380	410	± 5

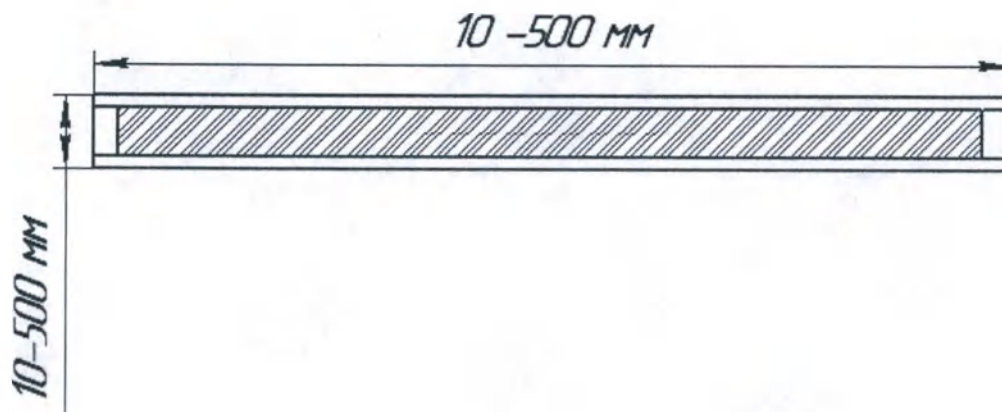


Рис. 10 – Лента операционная (10-500)х(10-500) мм с шагом 5 мм

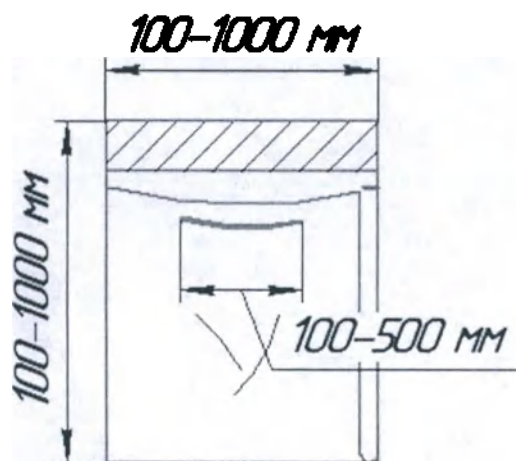


Рис. 11 – Мешок (липкий край) (100-1000)х(100-1000) мм с шагом 5 мм

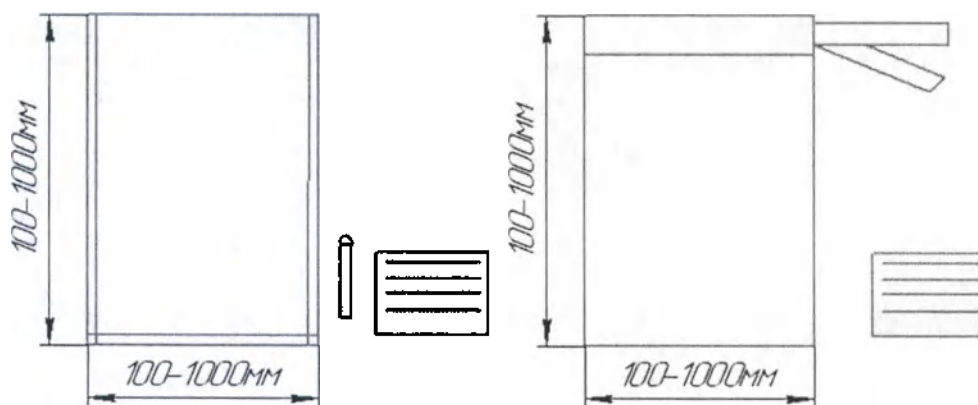


Рис. 12 – Мешок для медицинских отходов (100-1000)х(100-1000) мм с шагом 5 мм

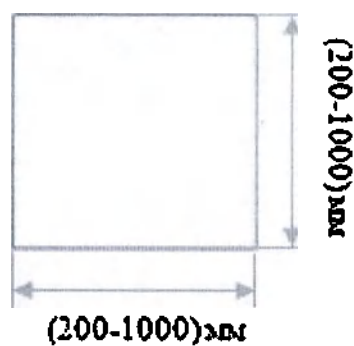


Рис. 13 – Наволочка (200-1000)х(200-1000) мм с шагом 5 мм

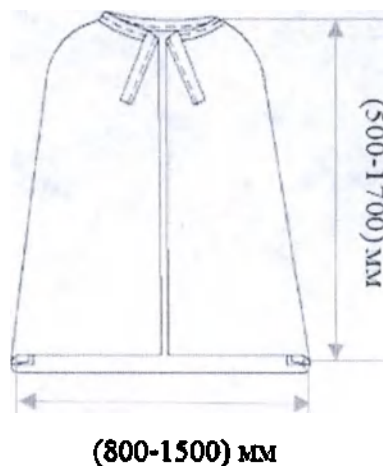


Рис. 14 – Накидка (500-1700)х(800-1500) мм с шагом 5 мм

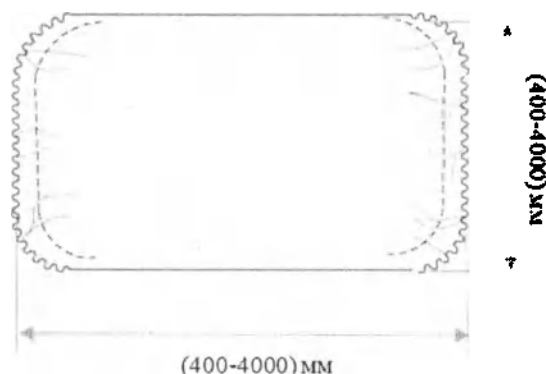


Рис. 15 – Наматрацник (400-4000)х(400-4000) мм с шагом 5 мм

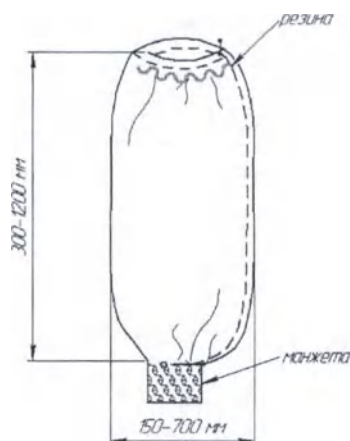


Рис. 16а – Нарукавники. *Вариант исполнения:* Нарукавники (150-700)х(300-1200) мм с шагом 5 мм (верх на резинке, низ на манжете)

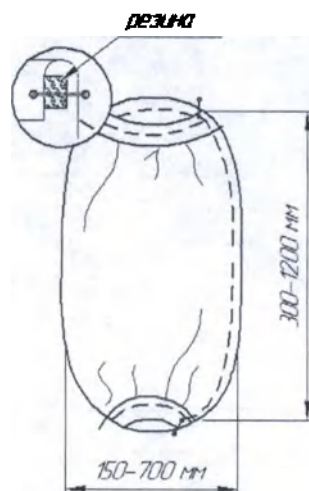


Рис. 16б – Нарукавники. *Вариант исполнения:* Нарукавники (150-700)х(300-1200) мм с шагом 5 мм (верх на резинке, низ на резинке)

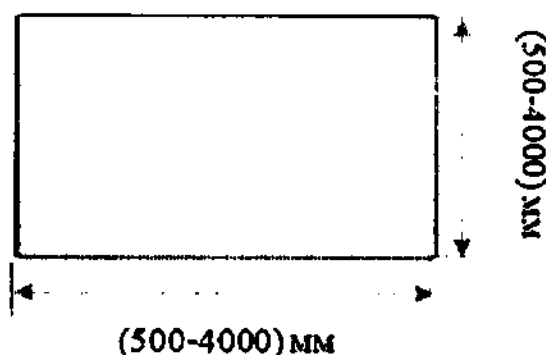


Рис. 17 – Одеяло педиатрическое (500-4000)х(500-4000) мм с шагом 5 мм

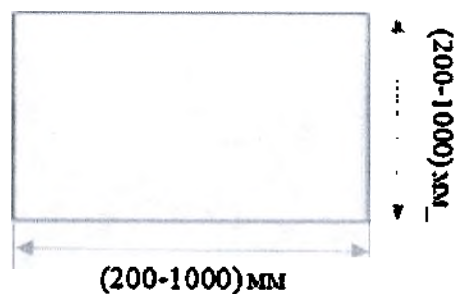


Рис. 18 – Пеленка (200-1000)х(200-1000) мм с шагом 5 мм

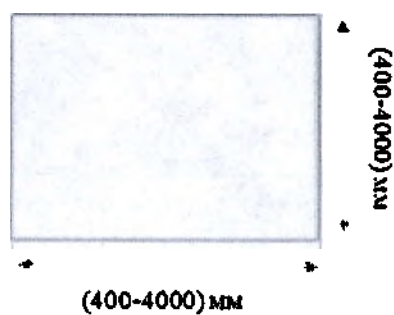


Рис. 19 – Пеленка впитывающая многослойная (400-4000)х(400-4000) мм с шагом 5 мм

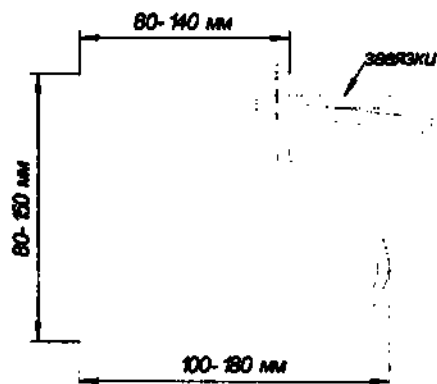


Рис. 20 – Пинетки (100-180) мм с шагом 5 мм

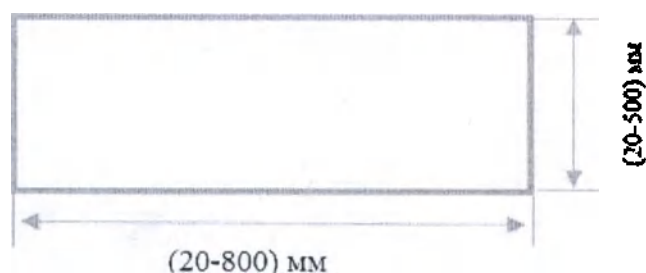


Рис. 21 – Повязка (20-500)х(20-800) мм с шагом 5 мм

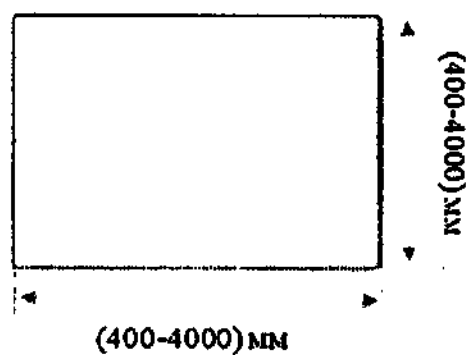


Рис. 22 – Пододеяльник (400-4000)х(400-4000) мм с шагом 5 мм

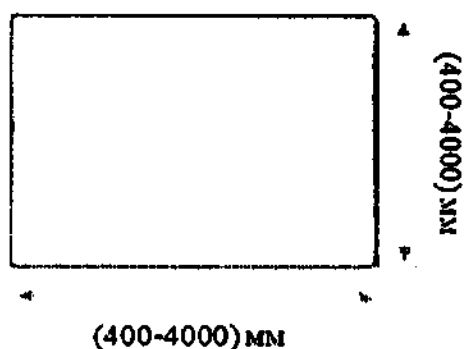


Рис. 23 – Подстилка (400-4000)х(400-4000) мм с шагом 5 мм

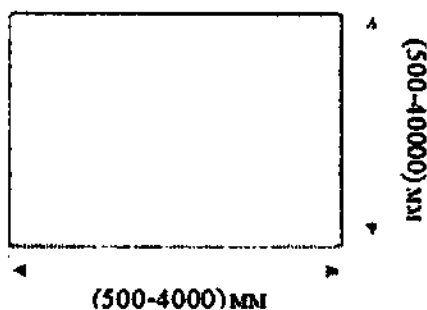


Рис. 24 – Покрывало педиатрическое (500-4000)х(500-4000) мм с шагом 5 мм

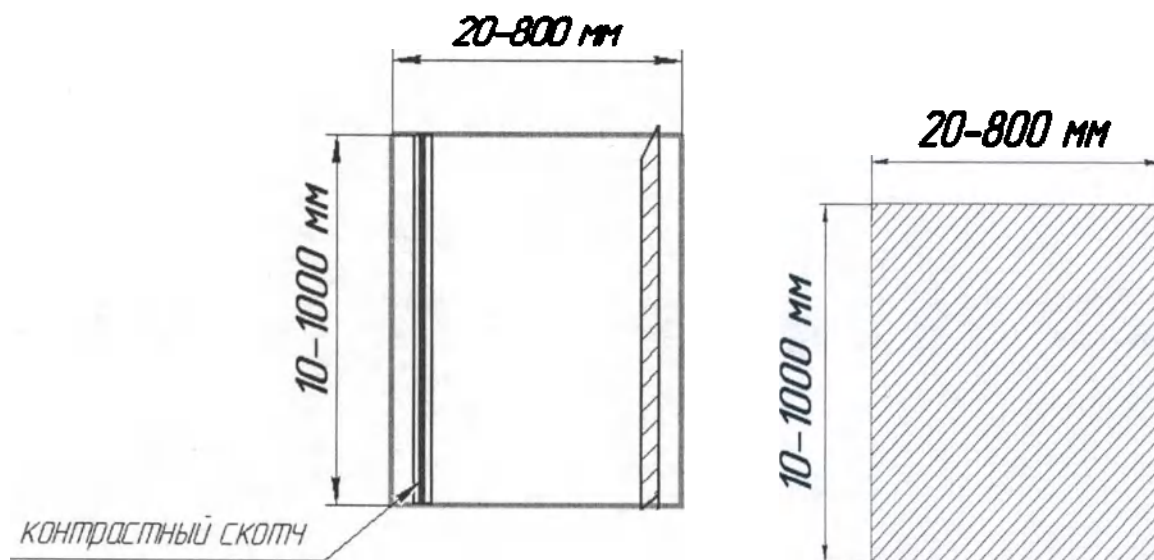


Рис. 25 – Пленка операционная (10-800)х(10-1000) мм с шагом 5 мм

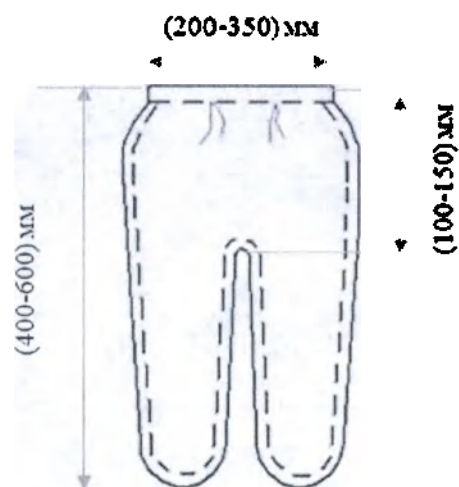


Рис. 26 – Ползунки (200-350)х(400-600) мм с шагом 5 мм

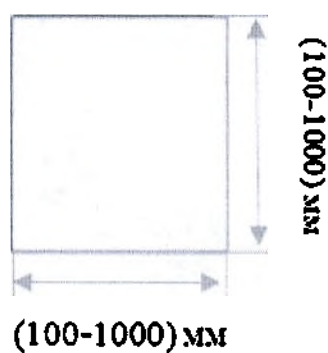


Рис. 27 – Полотенце (салфетка) (100-1000)х(100-1000) мм с шагом 5 мм

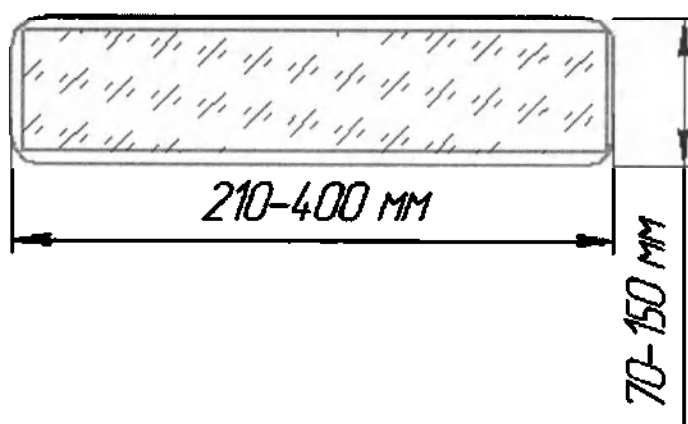


Рис. 28 – Прокладка (70-150)х(210-400) мм с шагом 5 мм

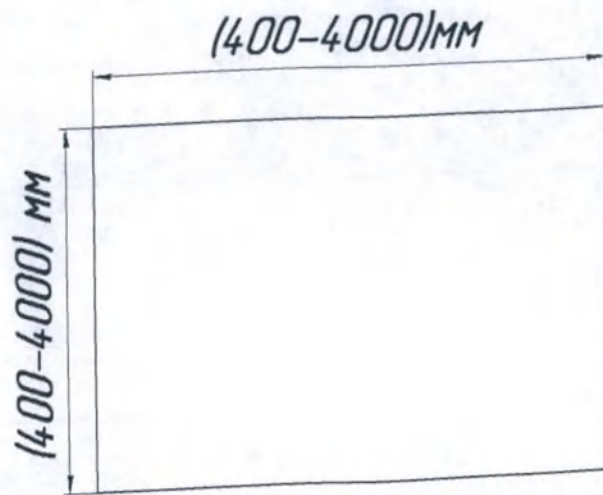


Рис. 29 – Простыня операционная (покрытие) (400-4000)х(400-4000) мм с шагом 5 мм

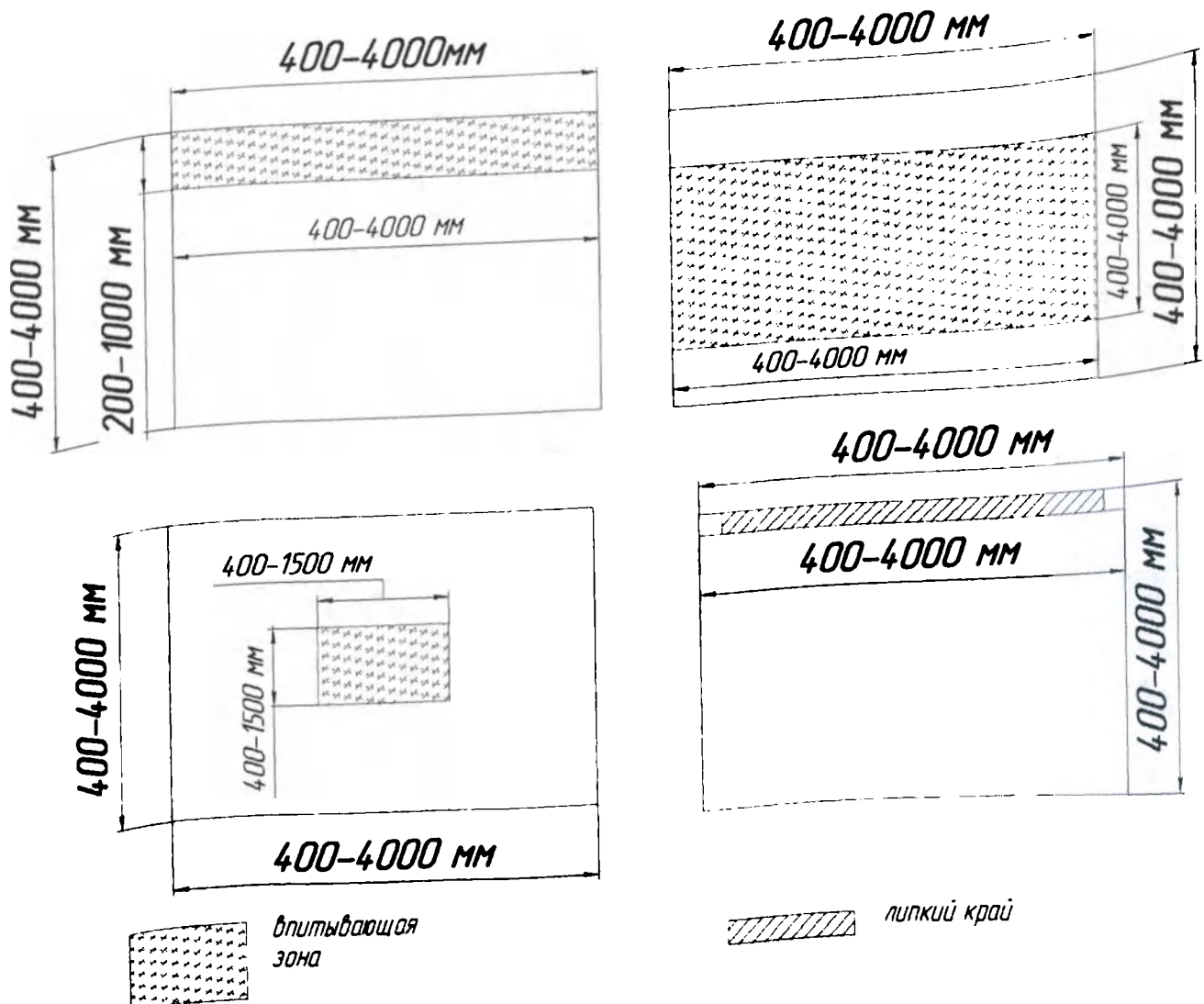


Рис. 30 – Простыня операционная (покрытие) (400-4000)х(400-4000) мм с шагом 5 мм (впитывающая зона/липкий край)

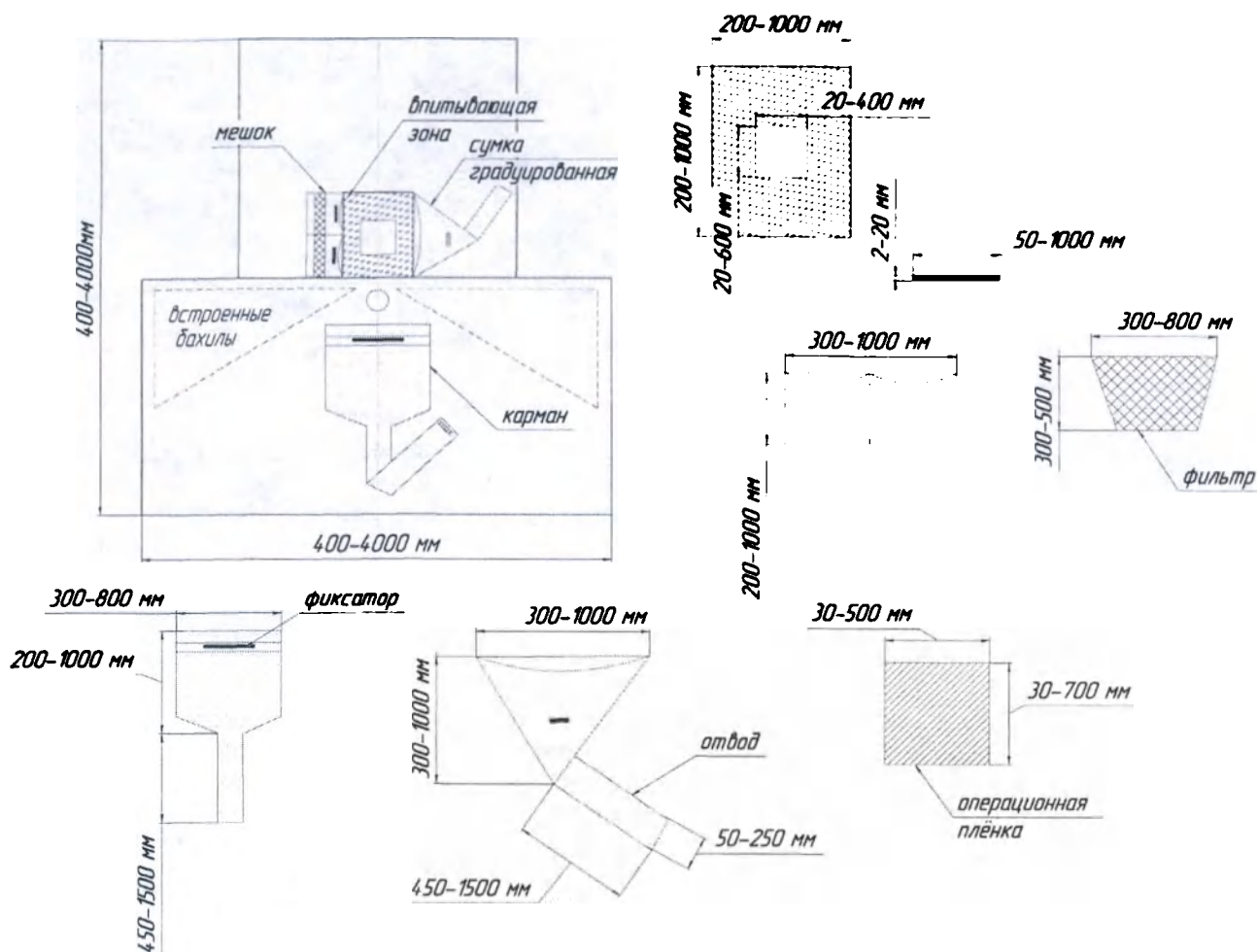


Рис. 31 – Простыня операционная (покрытие) (400-4000)х(400-4000) мм с шагом 5 мм, с отверстием (20-400)х(20-600)мм или диаметром (20-600)мм (операционная пленка/ впитывающая зона/ липкий край/ мешок для сбора жидкости (фиксатор/фильтр)/ карман (фиксатор/ отвод)/ градуированная сумка (отвод)/ дополнительные вставки/ встроенные бахилы)

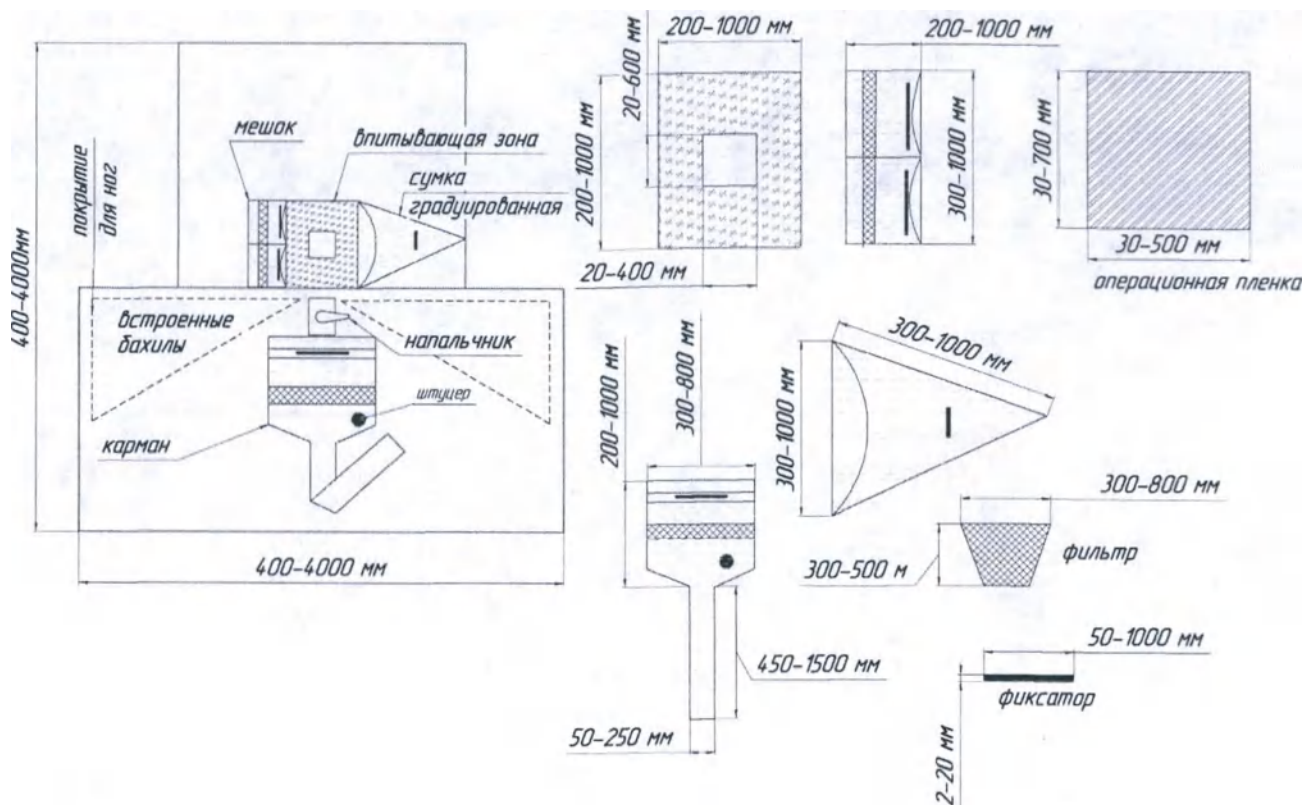


Рис.

32 - Простыня операцияльная (400-4000)×(400-4000) мм с шагом 5 мм с отверстием (20-400)х(20-600)мм или диаметром (20-600)мм (липкий край/впитывающая зона/операцияльная пленка/напальчник/встроенные бахилы/покрытие для ног/карман/мешок/сумка градуированная/фиксатор)

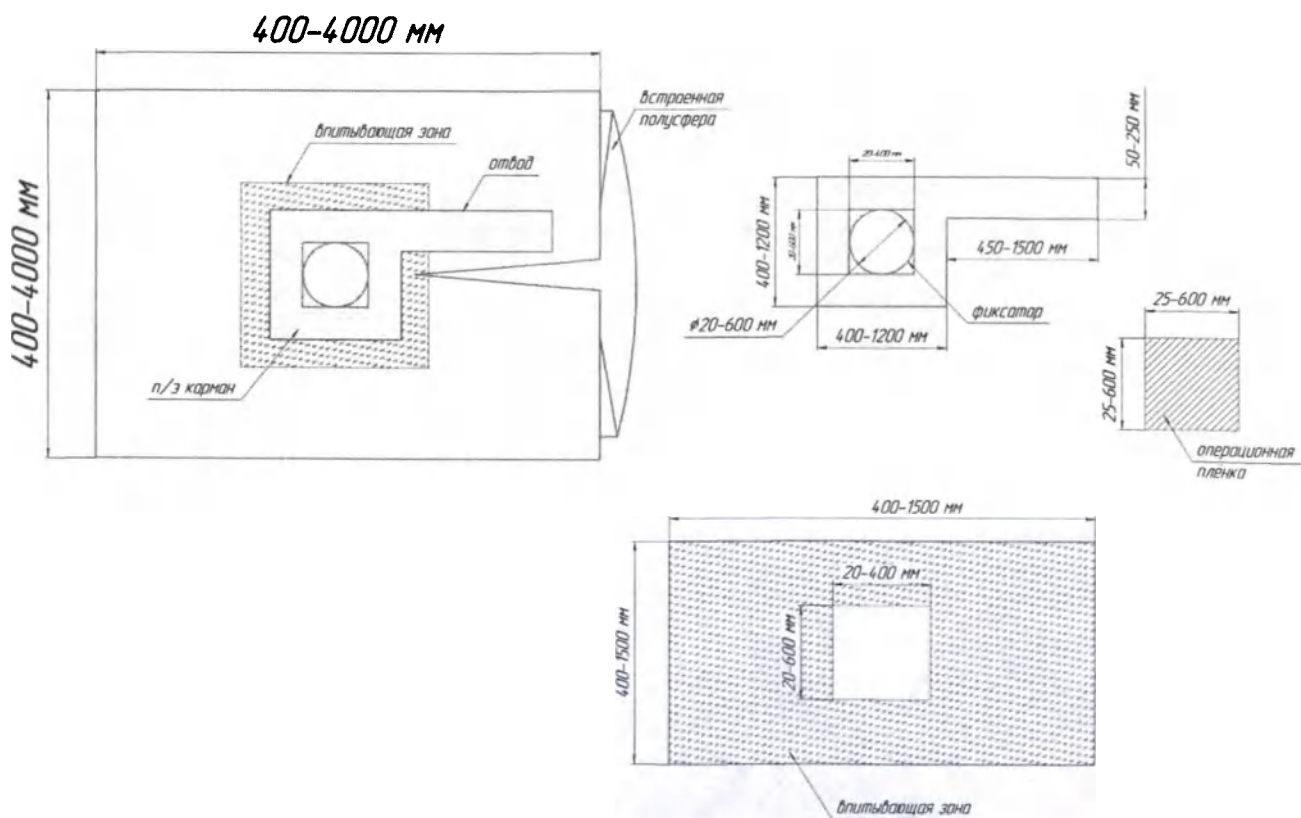


Рис. 33 – Простыня операцияльная (покрытие) (400-4000)×(400-4000) мм с шагом 5 мм с отверстием (20-400)х(20-600)мм или диаметром (20-600)мм (операцияльная пленка/карман/отвод/липкий край/фиксатор/ впитывающая зона/встроенная полусфера)

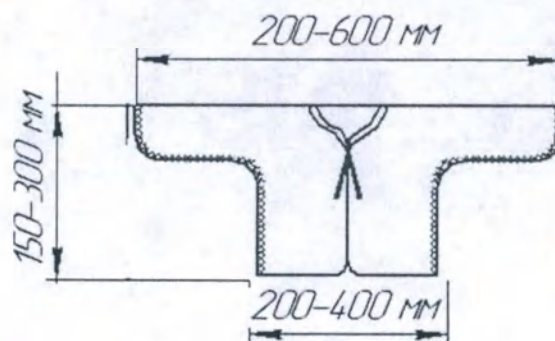


Рис. 34 – Распашонка (150-300)х(200-400) мм с шагом 5 мм

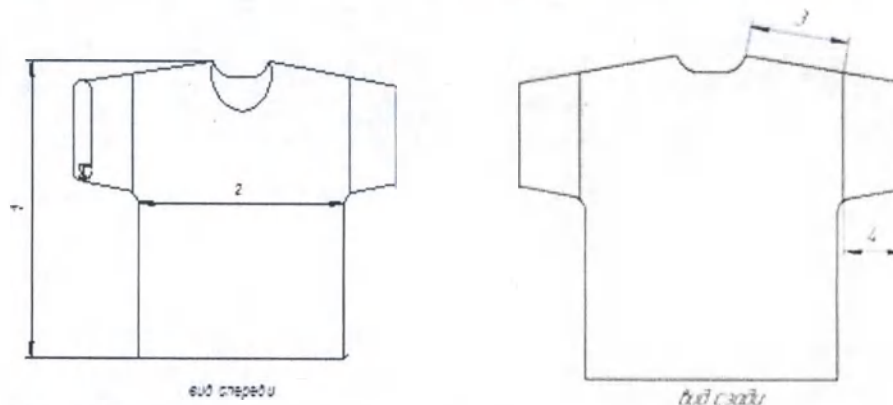


Рис. 35а – Рубашка (размеры 40-42, 44-48, 50-54, 56-60, 62-66, 68-72, 74-76, втачной рукав)

Обозначение	Наименование измерения	Размер							Допуск, %
		40-42	44-48	50-54	56-60	62-66	68-72	74-76	
1	Длина изделия, мм	750-810	770-830	790-850	810-870	830-890	850-910	850-910	± 10
2	Ширина изделия на уровне глубины проймы, мм	565	625	685	745	805	865	925	± 5
3	Ширина плеча, мм	200	225	250	275	300	325	350	± 5
4	Длина рукава, мм	100-200							± 5

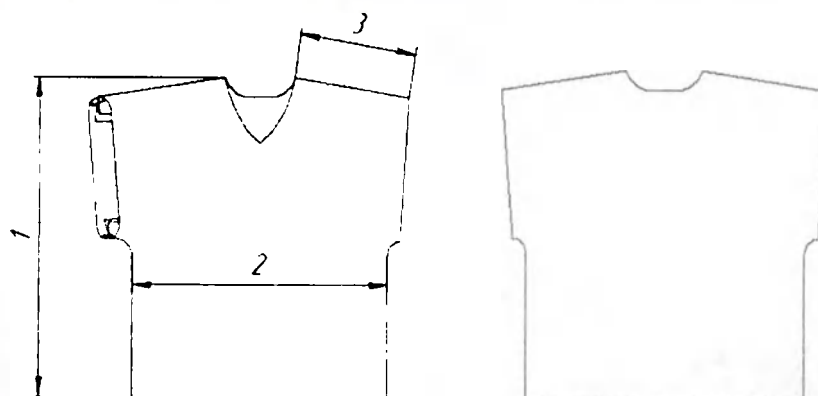


Рис. 35б – Рубашка (размеры 40-42, 44-48, 50-54, 56-60, 62-66, 68-72, 74-76, цельнокроеный рукав)

Обозначение	Наименование измерения	Размер							Допуск, %
		40-42	44-48	50-54	56-60	62-66	68-72	74-76	
1	Длина изделия, мм	700	740	760	780	800	830	960	± 10

2	Ширина изделия внизу, мм	550	620	680	740	800	860	930	± 5
3	Ширина плеча, мм	250	280	310	320	360	380	410	± 5

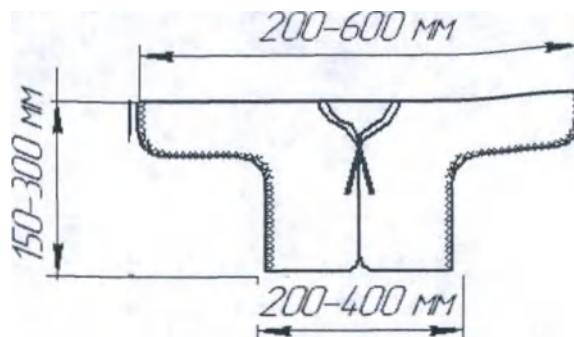


Рис. 36 – Рубашка для новорожденного (150-300)х(200-400) мм с шагом 5 мм

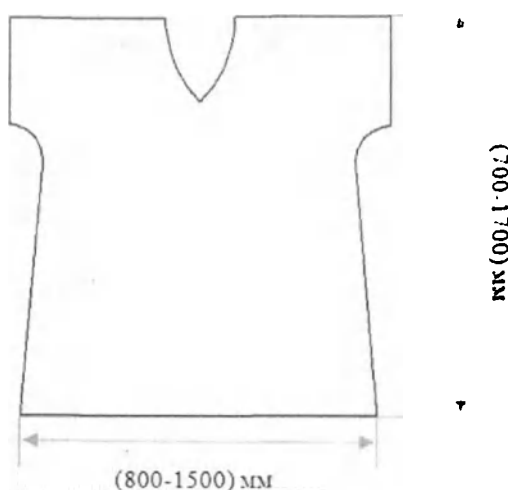


Рис. 37 – Рубашка для роженицы (800-1500)х(700-1700) мм с шагом 5 мм (с круглой или с V-образной горловиной)

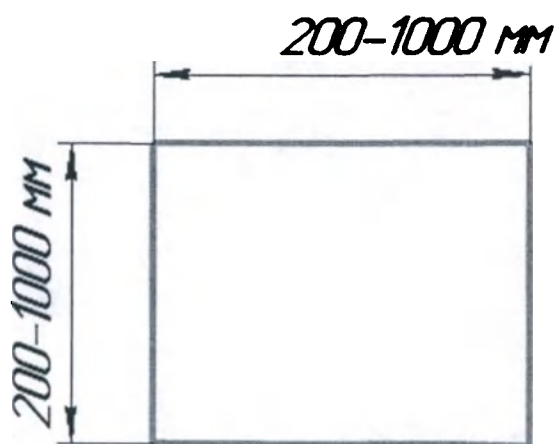


Рис. 38 – Салфетка хирургическая (200-1000)х(200-1000) мм с шагом 5 мм

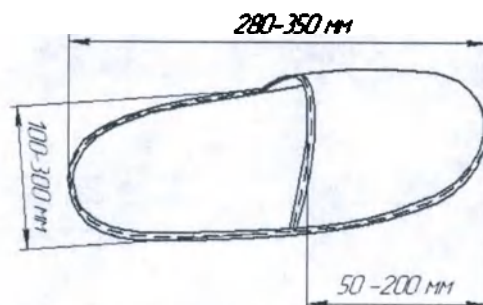


Рис. 39 – Тапочки (280-350) мм с шагом 5 мм

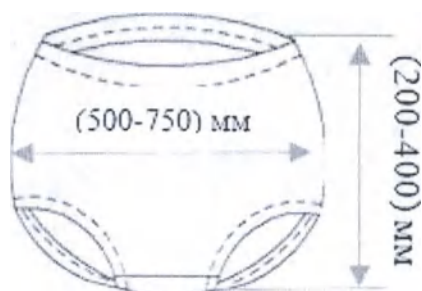


Рис. 40 – Трусики (200-400)х(500-750) мм с шагом 5 мм

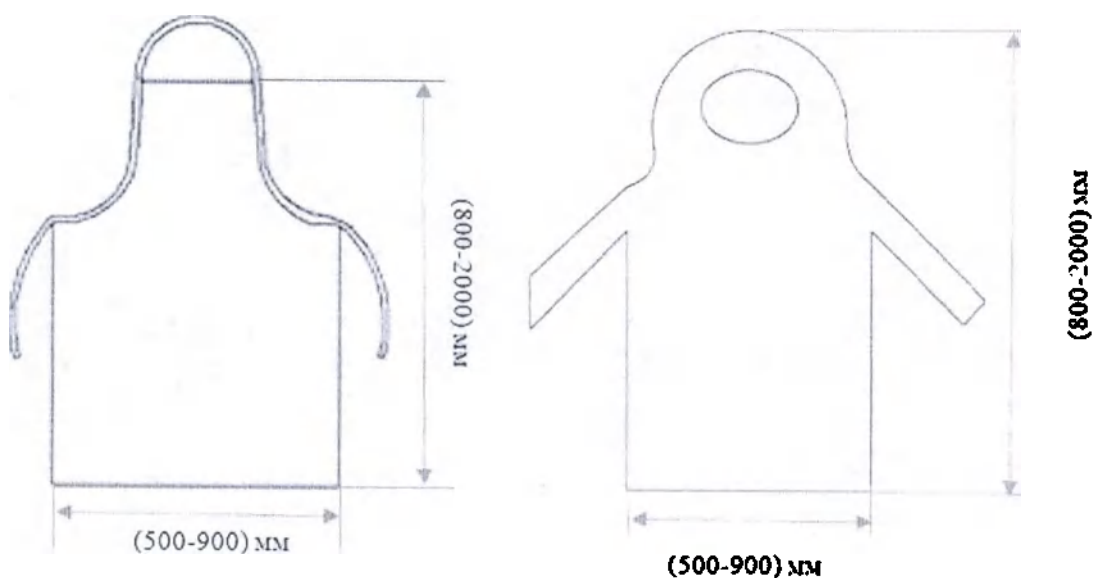


Рис. 41 – Фартук хирургический (500-900)х(800-1200) мм с шагом 5 мм


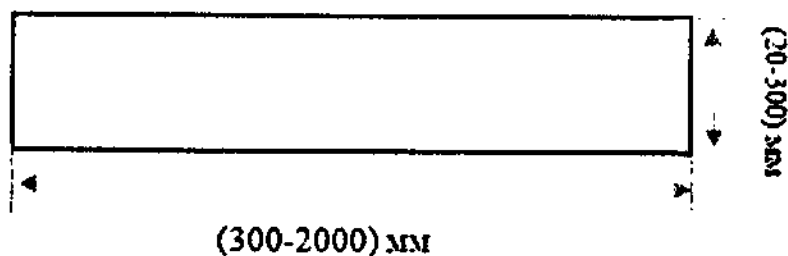


Рис. 42 – Фиксатор (держатель шнура) (20-300)х(300-2000) мм с шагом 5 мм

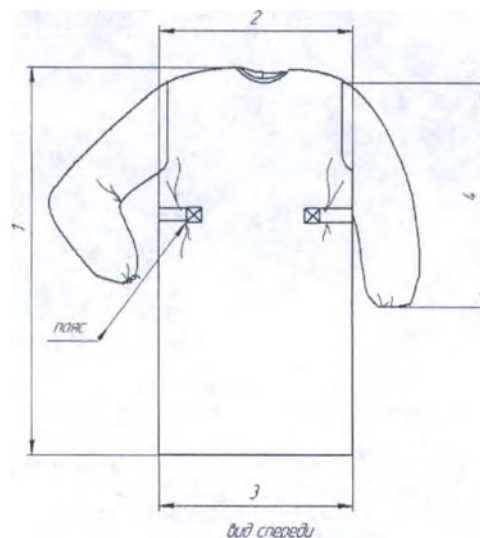

вид сверху

Рис. 43 –Халат хирургический (размеры 44-48, 50-54, 56-60, 62-66, 68-72, 74-76, длина 1050-1750 мм с шагом 5 мм, горловина на завязках или на липе, рукава на резинке или на манжете, с поясом)

Обозначение	Наименование измерения	Размер				
		44-48	50-54	56-60	62-66	Допуск, %
1	Длина изделия, мм	1050-1750				± 10
2	Ширина изделия на уровне глубины проймы (ПО), мм	685	745	805	865	± 10
3	Ширина изделия внизу (ПО), мм	685	745	805	865	± 10
4	Длина рукава, мм	300-700				± 10

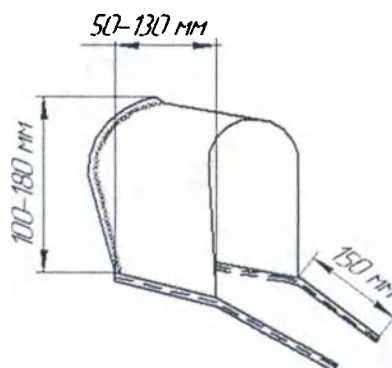


Рис. 44 – Чепчик (50-130)х(100-180) мм с шагом 5 мм

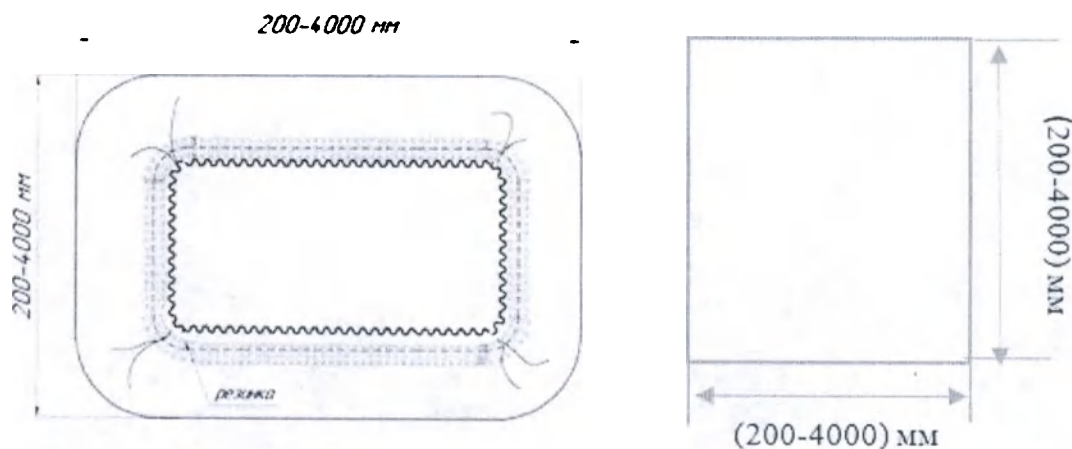


Рис. 45 – Чехол (200-4000)х(200-4000) мм с шагом 5 мм

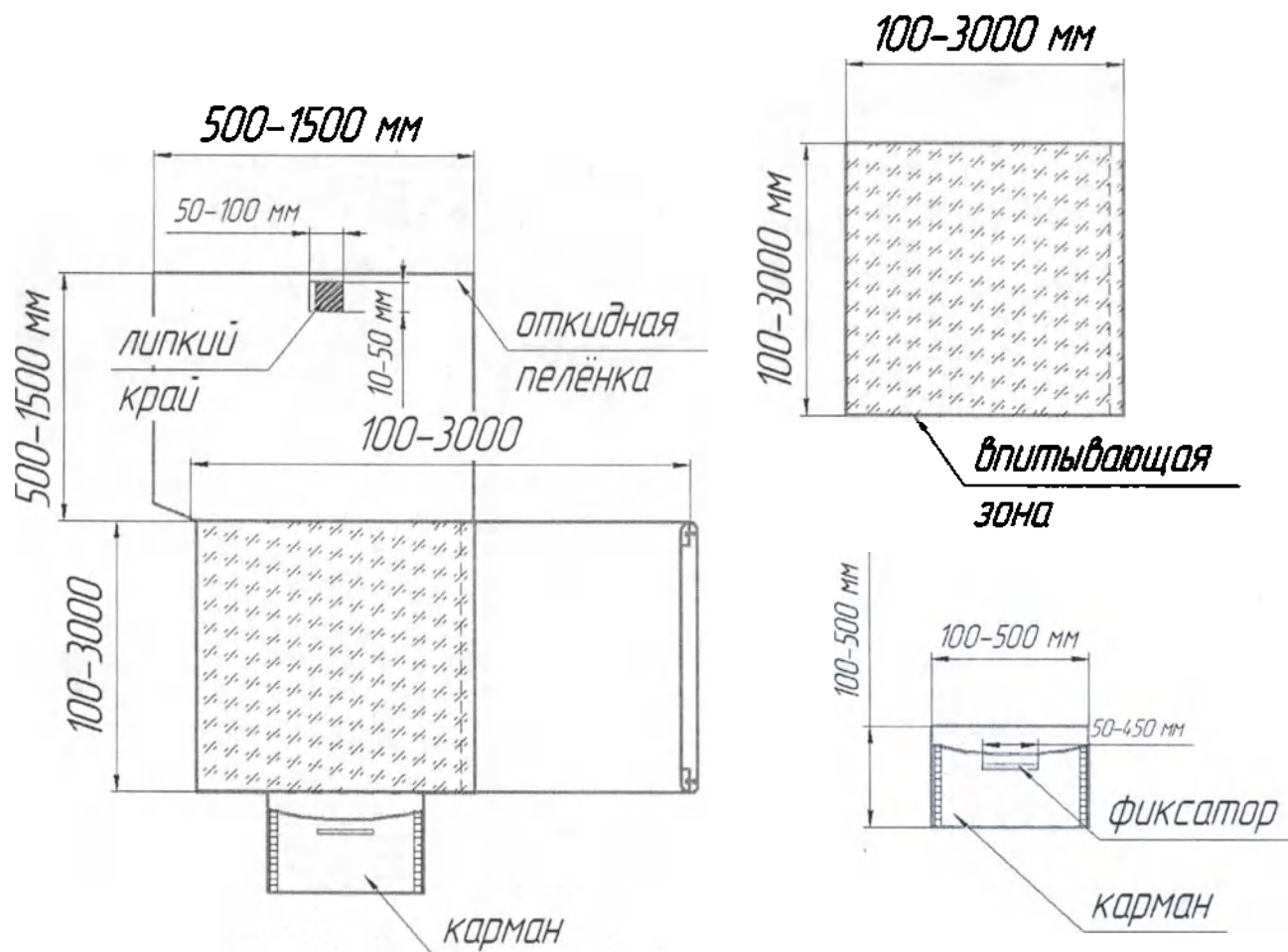


Рис. 46 – Чехол хирургический на инструментальный столик (100-3000)х(100-3000) мм с шагом 5 мм (впитывающая зона/ липкий край/ карман/ карман с фиксатором/ откидная пеленка)

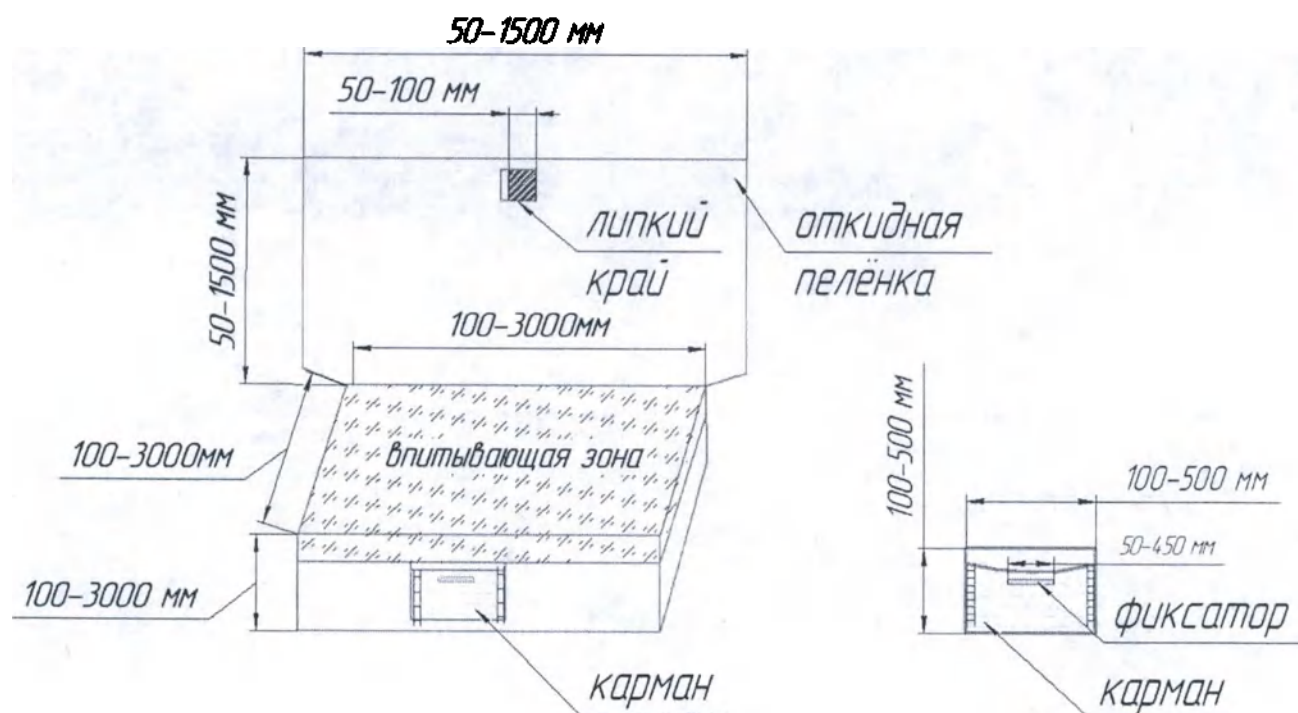


Рис. 47 – Чехол хирургический на инструментальный столик (100-3000)х(100-3000)х(100-3000) мм с шагом 5 мм (впитывающая зона/ липкий край/ карман/ карман с фиксатором/ откидная пеленка)

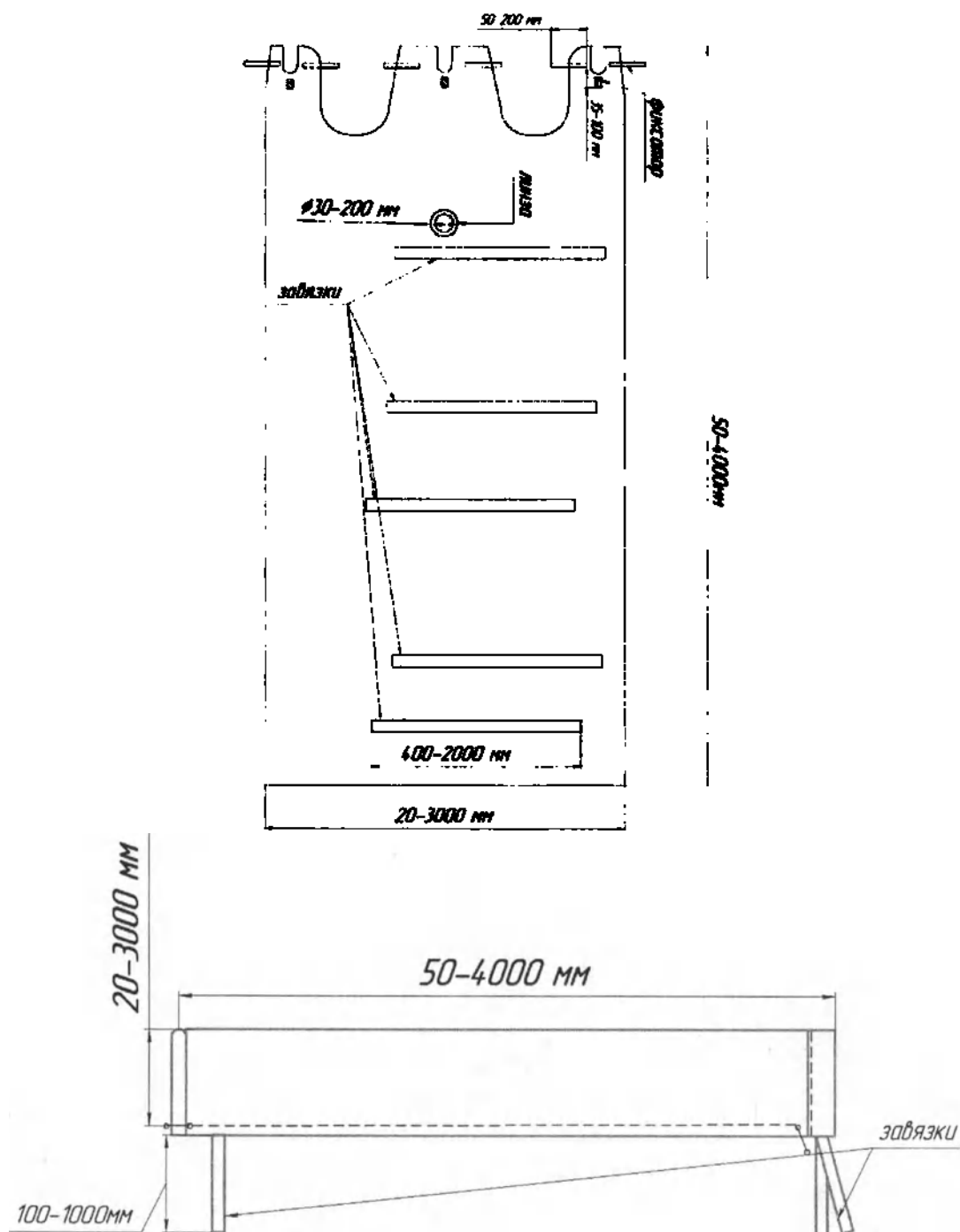


Рис. 48 – Чехол на оборудование (20-3000)х(50-4000) мм с шагом 5 мм или диаметром (50-4000) мм (завязки/ кулиски/ липкий край/ фиксатор)

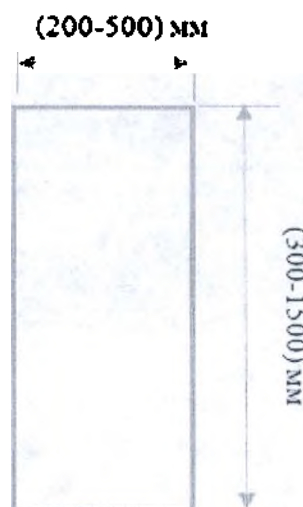


Рис. 49 – Чулки (носки) (200-500)х(300-1500) мм с шагом 5 мм

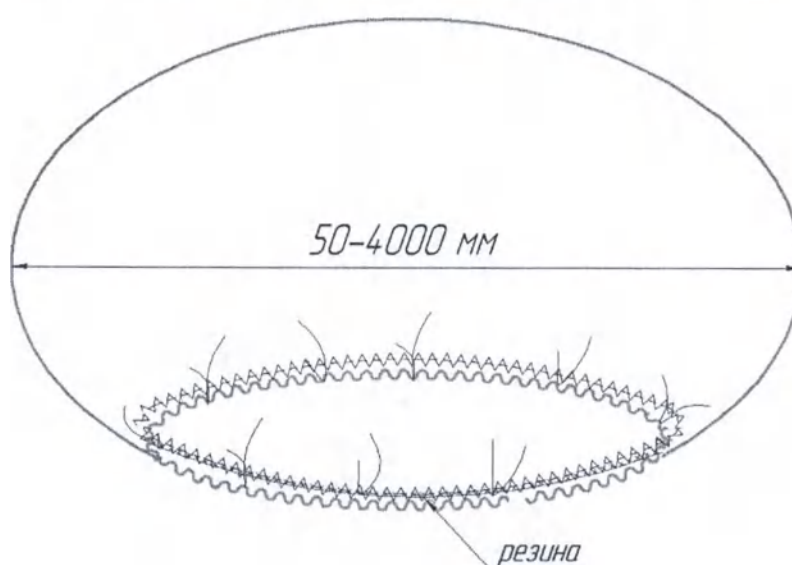


Рис. 50а – Шапочка (колпак). Вариант исполнения: Шапочка-берет

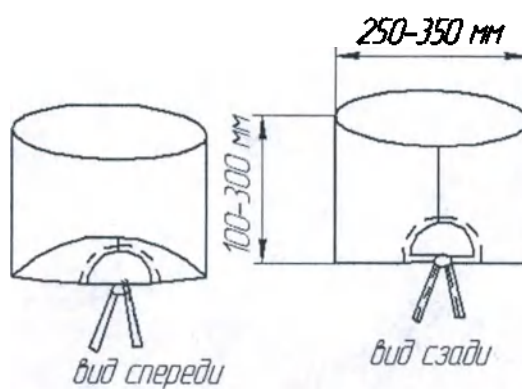


Рис. 50б – Шапочка (колпак). Вариант исполнения: Шапочка-колпак

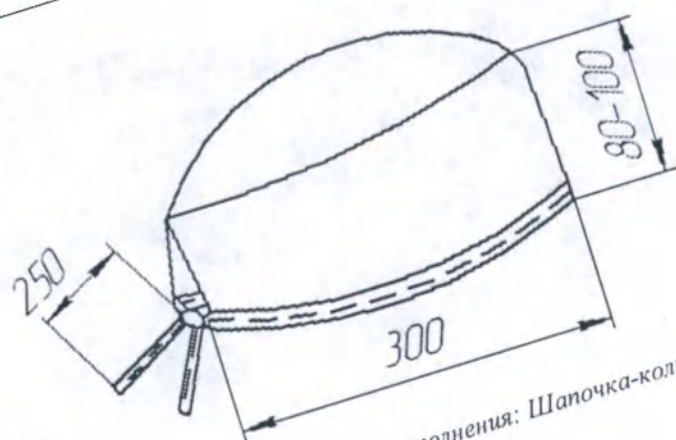


Рис. 50в – Шапочка (колпак). Вариант исполнения: Шапочка-колпак (окантовна)

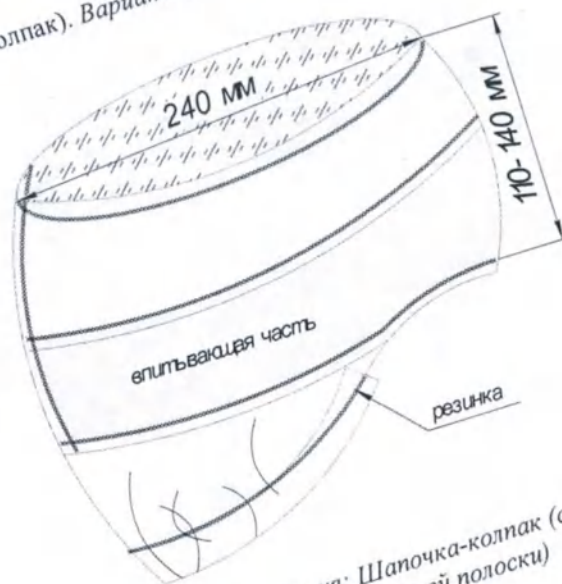


Рис. 50г – Шапочка (колпак). Вариант исполнения: Шапочка-колпак (с потовпитывающей полоской или без потовпитывающей полоски)

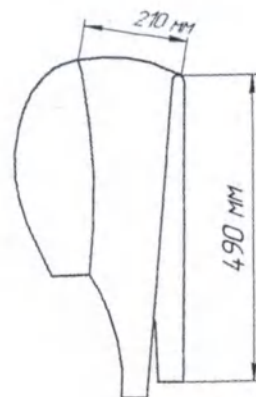


Рис. 50д – Шапочка (колпак). Вариант исполнения: Шапочка-косынка



Рис. 50е – Шапочка (колпак). Вариант исполнения: Шапочка-пилотка (на завязках или без завязок)

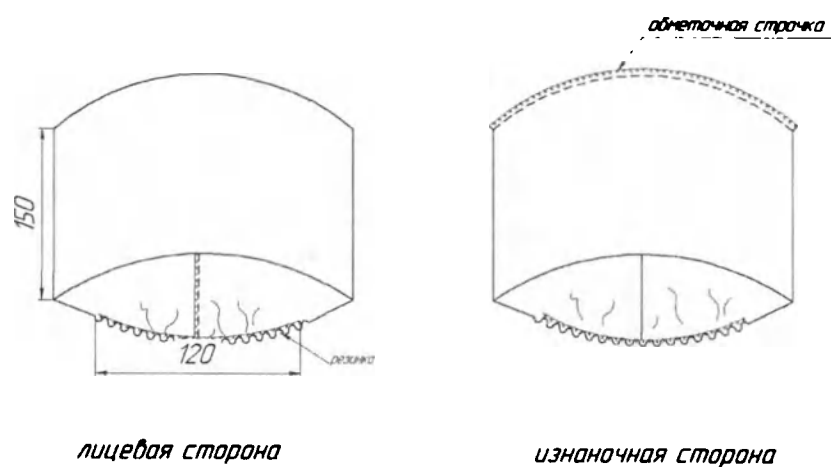


Рис. 50ж – Шапочка (колпак). Вариант исполнения: Шапочка-косак

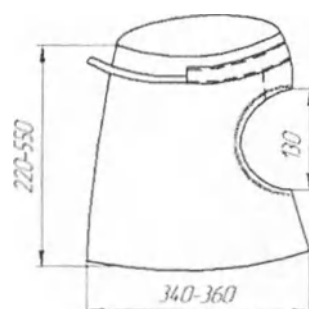


Рис. 50з – Шапочка (колпак). Вариант исполнения: Шапочка-шлем (пелерина, кулиски) (с потовпитывающей полоской или без потовпитывающей полоски)

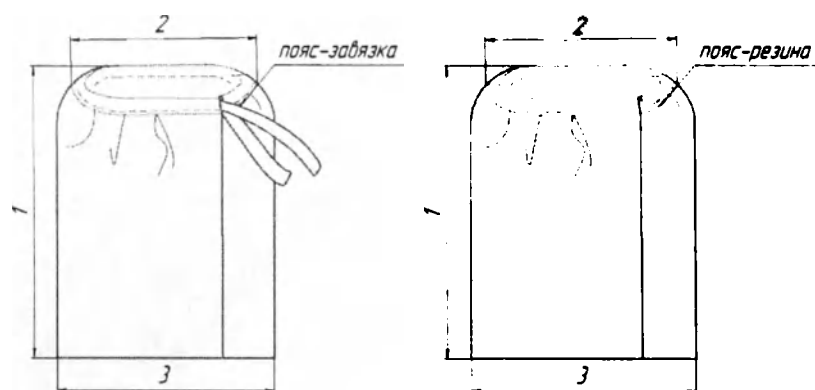


Рис. 51 – Юбка (размеры 40-42, 44-48, 50-54, 56-60, 62-66, 68-72, 74-76, пояс на резинке или на завязках)

Обозначение	Наименование измерения	Размер							Допуск, %
		40-42	44-48	50-54	56-60	62-66	68-72	74-76	
1	Длина изделия по боковому шву, мм	500	600	700	700	800	800	1000	± 5
2	Ширина изделия на уровне талии, мм	450	500	600	700	800	900	900	± 5
3	Ширина изделия по низу, мм	450	500	600	700	800	900	900	± 5

Прошнуровано, пронумеровано
в количестве 63
(шестьдесят три) листов
Генеральный директор Клевасов А.И.

