



МЕДКОМ-М

ИНН 7719049086

ЗАО "МЕДКОМ-М"

Юр. адрес: 105215, Москва, ул. 13-я Парковая, д. 27, к.4, комната правления.

Почтовый адрес: Россия, 107120 г. Москва, Б.Полуярский пер., д.16, 1эт.

Код по ОКПО 41565139 ; Код по ОКОНХ 71100

Расчетный счет: 40702810700000001146 в КБ "БФГ-КРЕДИТ"

ИНН банка: 7730062041 ; ОКПО банка: 40099936

Корр.счет: 30101810100000000162 ; БИК: 044579162

тел. (095) 917-11-11, 917-00-58

тел./факс (095) 925-91-55

e-mail: medkom@dol.ru

www.medkom-m.ru

Инструкция по использованию перчаток хирургических.

- 1. Перчатки хирургические применяются для проведения хирургических операций, а также в других отраслях медицины, где требуется защита врача и пациента от инфекций и загрязнений.**
- 2. Перчатки стерилизованы гамма-излучением. При вскрытии упаковки и надевании перчаток необходимо соблюдать условия стерильности.**
- 3. После использования промытые после обработки водным моющим раствором перчатки необходимо обработать внутри и снаружи биологически безвредным веществом во избежание слипания, просушить на воздухе и подвергнуть стерилизации.**
- 4. Допускается повторная стерилизация до 5 раз.**
- 5. При хранении и использовании не допускать воздействия на перчатки активных веществ, разрушающих резину.**
- 6. Хранить при температуре от 0 до 25 С, относительной влажности воздуха не более 85%.**

