
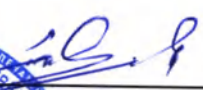


УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор  
ООО «МЕДМЭЛ»

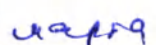

 Н.Г. Ломидзе

 2022г.

**Шкафы медицинские**

ШМЯ-01 – «МЕДМЭЛ», ШМП-01 – «МЕДМЭЛ», ШМБ-01 – «МЕДМЭЛ»,  
ШОМ1-01 – «МЕДМЭЛ», ШОМ2-01 – «МЕДМЭЛ», ШМЛД-01 – «МЕДМЭЛ»  
ШМПК-01 – «МЕДМЭЛ», ШМ2-01 – «МЕДМЭЛ».

**ПАСПОРТ**

**ГАБР.942819.001 ПС**

**2022**

Подп. и дата

взаим. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

# СОДЕРЖАНИЕ

Лист

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| 1. Общие указания .....              | 3  |
| 2. Общие сведения об изделии.....    | 3  |
| 3. Комплектность.....                | 4  |
| 4. Технические характеристики.....   | 5  |
| 5. Свидетельство о приемке.....      | 7  |
| 6. Свидетельство об упаковке.....    | 7  |
| 7. Транспортирование и хранение..... | 8  |
| 8. Гарантии изготовителя .....       | 9  |
| 9. Сведения о рекламациях .....      | 10 |

|             |                 |                 |          |                                                                                                                                                   |                    |        |  |
|-------------|-----------------|-----------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|--|
|             |                 |                 |          |                                                                                                                                                   |                    |        |  |
|             |                 |                 |          |                                                                                                                                                   |                    |        |  |
|             |                 |                 |          |                                                                                                                                                   | ГАБР.942819.001 ПС |        |  |
| Лист        | № документа     | Подпись         | Дата     |                                                                                                                                                   |                    |        |  |
| Разработал  | Сотников И.В.   | <i>Сотников</i> | 22.03.22 | ШМЯ-01-«МЕДМЭЛ», ШМП-01-«МЕДМЭЛ»,<br>ШМБ-01-«МЕДМЭЛ», ШОМ1-01-«МЕДМЭЛ», ШОМ2-01-«МЕДМЭЛ»,<br>ШМЛД-01-«МЕД-МЭЛ», ШМПК-01-«МЕДМЭЛ», ШМ2-01-«МЕДМЭЛ» |                    |        |  |
| Проверил    | Ушаков А.В.     | <i>Ушаков</i>   | 22.03.22 |                                                                                                                                                   |                    |        |  |
| Нач. отдела | <i>Нависова</i> | <i>Нависова</i> | 22.03.22 |                                                                                                                                                   |                    |        |  |
| Н. контроль |                 |                 |          |                                                                                                                                                   |                    |        |  |
| Утвердил    | Ломидзе Н.Г.    | <i>Ломидзе</i>  | 22.03.22 |                                                                                                                                                   |                    |        |  |
|             |                 |                 |          | Паспорт                                                                                                                                           |                    |        |  |
|             |                 |                 |          | Лит.                                                                                                                                              | Лист               | Листов |  |
|             |                 |                 |          |                                                                                                                                                   | 2                  | 10     |  |

Ф2. 106-5

Копировал

Формат А4

## 1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

- 1.1 Паспорт является документом, отражающим техническое состояние шкафа медицинского зав. № \_\_\_\_\_.
- 1.2 Все записи в паспорте должны производиться чернилами или тушью отчетливо и аккуратно. Подчистки, пометки, незавершенные исправления не допускаются. Записи, внесенные ОТК, должны быть заверены печатью.

## 2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

- 2.1 Шкафы медицинские предназначены для оснащения клиник, больниц, аптек и других учреждений практического и профилактического здравоохранения.
- 2.2 Шкафы медицинские изготавливаются в нескольких вариантах.
- Шкаф медицинский металлический для оснащения кабинета главной (старшей) медицинской сестры с внутренним сейфом для хранения лекарственных средств и ящиками для хранения медицинских изделий ШМЯ-01-«МЕДМЭЛЬ».
- Шкаф медицинский металлический для оснащения главной (старшей) медицинской сестры с внутренним сейфом для хранения лекарственных средств и полками для хранения ШМП-01-«МЕДМЭЛЬ».
- Шкаф медицинский металлический для хранения больничных хозяйственных принадлежностей ШМБ-01-«МЕДМЭЛЬ».
- Шкаф металлический для одежды медперсонала, в 2-х исполнениях:
- одностворчатый ШОМ1-01-«МЕДМЭЛЬ»;
  - двухстворчатый ШОМ2-01-«МЕДМЭЛЬ».
- Шкаф одностворчатый металлический для процедурных кабинетов с внутренним сейфом для хранения лекарственных средств. ШМЛД-01-«МЕДМЭЛЬ».
- Шкаф одностворчатый металлический двухсекционный с полками для процедурных кабинетов ШМПК-01-«МЕДМЭЛЬ».
- Шкаф медицинский металлический с двумя отсеками для процедурных кабинетов ШМ2-01-«МЕДМЭЛЬ».
- 2.3 Шкафы изготавливаются из стальной профильной трубы и стального листа.
- 2.4 Шкафы медицинские имеют четыре регулируемых опоры.
- 2.5 Все двери шкафов медицинских имеют внутренние замки.
- 2.6 Шкафы имеют полимерное покрытие белого цвета, наносимое методом порошкового напыления с последующей обработкой.

|      |      |             |         |      |                    |  |  |  |      |
|------|------|-------------|---------|------|--------------------|--|--|--|------|
|      |      |             |         |      |                    |  |  |  | Лист |
|      |      |             |         |      |                    |  |  |  | 3    |
| Изд. | Лист | № документа | Подпись | Дата | ГАЗР.943819.001 ПК |  |  |  |      |

## КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 Комплект поставки должен соответствовать указанному в таблицах.

Таблица 1

| Наименование изделия    | Децимальный номер изделия | Количество штук |
|-------------------------|---------------------------|-----------------|
| 1. Шкаф ШМЯ-01-«МЕДМЭЛ» | ГАБР.942819.001           | 1               |
| 2. Ящик                 | ГАБР.304000.001           | 5               |
| 3. Металлическая полка  | ГАБР.806010.001           | 5               |
| 4. Паспорт              | ГАБР.942819.001 ПС        | 1               |

Таблица 2

| Наименование изделия    | Децимальный номер изделия | Количество штук |
|-------------------------|---------------------------|-----------------|
| 1. Шкаф ШМП-01-«МЕДМЭЛ» | ГАБР.942819.026 – 01      | 1               |
| 2. Металлическая полка  | ГАБР.806010.001           | 7               |
| 3. Паспорт              | ГАБР.942819.001 ПС        | 1               |

Таблица 3

| Наименование изделия    | Децимальный номер изделия | Количество штук |
|-------------------------|---------------------------|-----------------|
| 1. Шкаф ШМБ-01-«МЕДМЭЛ» | ГАБР.942819.001 – 02      | 1               |
| 2. Металлическая полка  | ГАБР.806010.001           | 9               |
| 3. Паспорт              | ГАБР.942819.001 ПС        | 1               |

Таблица 4

| Наименование изделия     | Децимальный номер изделия | Количество штук |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| 1. Шкаф ШОМ1-01-«МЕДМЭЛ» | ГАБР.942819.001 – 03      | 1               |
| 2. Подставка под обувь   | ГАБР.304010.001           | 2               |
| 3. Паспорт               | ГАБР.942819.001 ПС        | 1               |

Таблица 5

| Наименование изделия     | Децимальный номер изделия | Количество штук |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| 1. Шкаф ШОМ2-01-«МЕДМЭЛ» | ГАБР.942819.001 – 04      | 1               |
| 2. Подставка под обувь   | ГАБР.304010.001           | 4               |
| 3. Паспорт               | ГАБР.942819.001 ПС        | 1               |

|      |      |             |         |      |                    |      |
|------|------|-------------|---------|------|--------------------|------|
|      |      |             |         |      | ГАБР.942819.001 ПС | Лист |
| Изм. | Лист | № документа | Подпись | Дата |                    | 4    |

Таблица 6

| Наименование изделия     | Децимальный номер Изделия | Количество штук |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| 1. Шкаф ШМЛД-01-«МЕДМЭЛ» | ГАБР.943819.001-05        | 1               |
| 2. Металлическая полка   | ГАБР.806010.001           | 4               |
| 3. Паспорт               | ГАБР.943819.001 ПС        | 1               |

Таблица 7

| Наименование изделия     | Децимальный номер изделия | Количество штук |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| 1. Шкаф ШМПК-01-«МЕДМЭЛ» | ГАБР.943819.001-06        | 1               |
| 2. Металлическая полка   | ГАБР.806010.001           | 6               |
| 3. Паспорт               | ГАБР.943819.001 ПС        | 1               |

Таблица 8

| Наименование изделия    | Децимальный номер изделия | Количество штук |
|-------------------------|---------------------------|-----------------|
| 1. Шкаф ШМ2-01-«МЕДМЭЛ» | ГАБР.943819.001-07        | 1               |
| 2. Ящик                 | ГАБР.304000.001           | 5               |
| 3. Металлическая полка  |                           | 3               |
| 4. Паспорт              | ГАБР.943819.001 ПС        | 1               |

#### 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 4.1 Шкаф ШМЯ-01-«МЕДМЭЛ» разделен на два отсека по горизонтали. Верхний отсек имеет три съемные металлические полки и закрывается двумя стеклянными дверцами. Нижний отсек разделен по вертикали на две части. Левая часть имеет сейф и одну металлическую полку. Правая часть имеет пять выдвижных ящиков, верхний имеет замок.
- 4.2 Шкаф ШМП-01-«МЕДМЭЛ» разделен на два отсека по горизонтали. Верхний отсек имеет три съемные металлические полки и закрывается двумя стеклянными дверцами. Нижний отсек разделен по вертикали на две части. Левая часть имеет сейф и одну металлическую полку. Правая часть имеет три металлические полки.
- 4.3 Шкаф ШМБ-01-«МЕДМЭЛ» разделен на два отсека по горизонтали. Верхний отсек имеет три съемные металлические полки и две стеклянные дверцы. Нижний отсек разделен по вертикали на две части. Каждая часть имеет по три полки и одной двери.

|      |      |             |         |      |                    |      |
|------|------|-------------|---------|------|--------------------|------|
|      |      |             |         |      | ГАБР.942819.001 ПС | Лист |
| Изм. | Лист | № документа | Подпись | Дата |                    | 5    |

Ф2.106-5а

Копировал

Формат А4

- 4.4 Шкаф ШОМ2-01-«МЕДМЭЛ» разделен по вертикали на два одинаковых отсека, каждый из которых имеет дверь с замком, вертикальную перегородку, полку для головных уборов, перекладину для вешалок и две подставки для обуви.
- 4.5 Шкаф ШМЛД-01-«МЕДМЭЛ» имеет два отсека по горизонтали. Верхний отсек имеет три съемные металлические полки и стеклянную дверцу. Нижний отсек имеет сейф, одну металлическую полку и дверцу.
- 4.6 Шкаф ШОМ1-01-«МЕДМЭЛ» имеет вертикальную перегородку, полку для головных уборов, перекладину для вешалок, две подставки для обуви и дверь.
- 4.7 Шкаф ШМПК-01-«МЕДМЭЛ» разделен на два отсека по горизонтали. Каждый отсек имеет по три съемные металлические полки. Верхний отсек имеет стеклянную дверь, а нижний - металлическую.
- 4.8 Шкаф ШМ2-01-«МЕДМЭЛ» разделен на два отсека по горизонтали. Верхний отсек имеет три съемные металлические полки и закрывается стеклянной дверцей. Нижний отсек имеет пять выдвижных ящиков.
- 4.9 Металлические полки шкафов выдерживают равномерно-распределенную нагрузку массой:
- ШМЯ-01-«МЕДМЭЛ», ШМП-01-«МЕДМЭЛ», ШМБ-01-«МЕДМЭЛ» – 12кг;
- ШОМ1-01-«МЕДМЭЛ», ШОМ2-01-«МЕДМЭЛ», ШМЛД-01-«МЕДМЭЛ», ШМПК-01-«МЕДМЭЛ», ШМ2-01-«МЕДМЭЛ» – 8 кг.
- 4.10 Габаритные размеры шкафов, не более, мм - (высота, ширина, глубина):
- ШМЯ-01-«МЕДМЭЛ», ШМП-01-«МЕДМЭЛ», ШМБ-01-«МЕДМЭЛ», ШОМ2-01-«МЕДМЭЛ» – 1950\*850\*420.
- ШМЛД-01-«МЕДМЭЛ», ШМПК-01-«МЕДМЭЛ», ШМ2-01-«МЕДМЭЛ», ШОМ1-01-«МЕДМЭЛ» – 1950\*650\*420.
- 4.11 Масса шкафов, не более, кг:
- ШМЯ-01-«МЕДМЭЛ» – 70, ШМП-01-«МЕДМЭЛ» - 65, ШМБ-3 – 60, ШОМ2-01 - 60, ШМЛД-01-«МЕДМЭЛ» - 45, ШМПК-01-«МЕДМЭЛ» – 40, ШМ2-01-«МЕДМЭЛ» – 40, ШОМ-01-«МЕДМЭЛ» – 45.
- 4.12 Шкафы устойчивы на горизонтальной плоскости.
- 4.13 Шкафы медицинские изготавливаются в климатическом исполнении УХЛ категории 4.2. по ГОСТ 15150.

|      |      |             |         |      |                    |           |
|------|------|-------------|---------|------|--------------------|-----------|
|      |      |             |         |      | ГАБР.942819.001 ПС | Лист<br>6 |
| Изм. | Лист | № документа | Подпись | Дата |                    |           |

Ф2.106-5а

Копировал

Формат А4

## 5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Шкаф медицинский, заводской номер \_\_\_\_\_

признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска \_\_\_\_\_

М.П.

\_\_\_\_\_   
подпись представителя ОТК

## 6. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

ШКАФ медицинский, заводской номер \_\_\_\_\_

упакован на предприятии \_\_\_\_\_

Дата упаковки \_\_\_\_\_

М.П.

Упаковку произвел \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_   
подпись

|      |      |             |         |      |                    |      |
|------|------|-------------|---------|------|--------------------|------|
|      |      |             |         |      | ГАБР.942819.001 ПС | Лист |
|      |      |             |         |      |                    | 7    |
| Изм. | Лист | № документа | Подпись | Дата |                    |      |

Ф2.106-5а

Копировал

Формат А4

## 7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- 7.1 Шкафы медицинские допускается транспортировать всеми видами крытого транспорта с соблюдением правил перевозки, которые действуют на данном виде транспорта.
- 7.2 Транспортирование морским транспортом должно производиться в соответствии с действующими правилами безопасности морской перевозки грузов.
- 7.3 Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов должны соответствовать группе 5 по ГОСТ 15150.
- 7.4 Хранение шкафов медицинских должно производиться в упаковке предприятия-изготовителя в сухих складских помещениях поставщика или потребителя, исключающих воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред. Для отапливаемых складов, условия хранения в части воздействия климатических факторов должны соответствовать группе условий хранения 2 по ГОСТ 15150.

|      |      |             |         |      | ГАБР.942819.001 ПС | Лист |
|------|------|-------------|---------|------|--------------------|------|
|      |      |             |         |      |                    | 8    |
| Изм. | Лист | № документа | Подпись | Дата |                    |      |

Ф2.106-5а

Копировал

Формат А4

## 8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

8.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие шкафов медицинских требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, правил транспортирования и хранения.

8.2 Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки его с предприятия-изготовителя.

8.3 В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель безвозмездно ремонтирует или заменяет изделие по предъявлению гарантийного талона.

8.4 Потребитель лишается права на гарантийное обслуживание в следующих случаях:

- при истечении срока гарантии;
- при нарушении правил эксплуатации и хранения;
- при наличии механических повреждений наружных частей изделий вызванных неаккуратным обращением в процессе эксплуатации.

|      |      |             |         |      |                                   |      |
|------|------|-------------|---------|------|-----------------------------------|------|
|      |      |             |         |      | Г А Б Р . 9 4 2 8 1 9 . 0 0 1 П С | Лист |
|      |      |             |         |      |                                   | 9    |
| Изм. | Лист | № документа | Подпись | Дата |                                   |      |

Ф2.106-5а

Копировал

Формат А4

## 9. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

9.1 В случае возникновения поломок деталей, входящих в шкаф медицинский, в период гарантийного срока, необходимо составить технически обоснованный АКТ рекламации и сделать выписку из раздела «Свидетельство о приемке».

АКТ с приложениями следует направить на предприятие, осуществляющее гарантийное обслуживание шкафа медицинского.

9.2 Гарантийное обслуживание шкафа медицинского производит предприятие «МЕДМЭЛ», расположенное по адресу:

г. Москва, 2-ой Амбулаторный проезд дом 8, строение 3.

Тел./факс : (095) 152-19-84.

9.3 Сведения о предъявленных рекламациях следует регистрировать в таблице 9.

Таблица 9

| Дата | Номер рекламационного акта | Краткое содержание рекламационного акта | Меры, принятые по рекламации |
|------|----------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|
|      |                            |                                         |                              |

|      |      |             |         |      |                    |      |
|------|------|-------------|---------|------|--------------------|------|
|      |      |             |         |      | ГАБР.942819.001 ПС | Лист |
|      |      |             |         |      |                    | 10   |
| Изм. | Лист | № документа | Подпись | Дата |                    |      |

Всего пронумеровано, прошнуровано  
и скреплено печатью 10 листов  
Бесчастных  
(Кол-во страниц)  
Ген. Директор И.С.Е.  
(Подпись)

