



Утверждаю

Технический директор

С.Г. Ивченко

26.11 2014 г.

Инструкция по применению медицинского изделия  
Крышка-капельница для флаконов с лекарственными средствами  
ТУ 9467-141-00480201-2014

Назначение

Крышка-капельница для флаконов с лекарственными средствами предназначена для укупоривания флаконов и капельного дозирования стерильных и нестерильных лекарственных средств.

Основные технические характеристики:

- обеспечивает герметичное укупоривание флаконов с наружным диаметром горловины 12,5 мм;
- образует  $21 \pm 5$  % капель в 1 мл воды
- не придает воде посторонний запах.

Транспортирование: всеми видами крытых транспортных средств при температуре от минус 50 °С до 50 °С.

После транспортирования в условиях отрицательных температур крышки-капельницы в транспортной таре должны быть выдержаны в нормальных климатических условиях не менее 24 ч.

Условия хранения: при температуре от 5 до 40 °С на стеллажах на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, в местах защищенных от света и агрессивных сред.

Используется в производстве лекарственных средств.

Способ применения

Вскрыть флакон с лекарственным средством. Плотнo надеть крышку-капельницу на горловину флакона. Перевернуть флакон и, надавливая на боковые стенки крышки-капельницы, ввести лекарственное средство в соответствии с инструкцией по медицинскому применению. По окончании процедуры отсоединить колпачок от корпуса и надеть его на крышку-капельницу.

Утилизация изделия в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».

Гарантии производителя

Производитель гарантирует качество крышек-капельниц при соблюдении условий транспортирования, хранения и применения.

Гарантийный срок годности - 5 лет с даты изготовления в упаковке предприятия-производителя.