

КОПИЯ



220019067-001 1/2 ⑧

俄罗斯 EDC

2022/02/25

证明书

CERTIFICATE



中国国际贸易促进委员会暨中国国际商会

China Council for the Promotion of International Trade is China Chamber of International Commerce

01094495

中国国际贸易促进委员会



China Council for the Promotion of International Trade
China Chamber of International Commerce

证明书 CERTIFICATE



221100B0/005397

号码 No.

兹证明：在所附文件上的浙江拱东医疗器械股份有限公司的印章属实。

THIS IS TO CERTIFY THAT: the seal of ZHEJIANG GONGDONG MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD. on the annexed DOCUMENT is genuine.



China Council for the Promotion
of International Trade

授权签字:

Authorized
Signature:

Lyu Cuilian

日期: 2022年01月28日

(Date: Jan. 28, 2022)

证明书查询网址 Website for verifying the certificate: <http://www.rzccpit.com/validate.html>

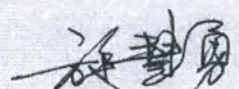
«УТВЕРЖДАЮ» / «APPROVE»

/

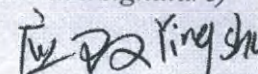
(должность/position)

(имя/name)

(подпись/signature)

 Shi HuiYong

Position: CEO

 Ying shu
Sales Manager

M.П. / Stamp

2021-12-30

浙江拱东医疗器械股份有限公司
ZHEJIANG GONGDONG
MEDICAL TECHNOLOGY CO.,LTD.

Zhejiang Gongdong Medical Technology Co. Ltd.

INSTRUCTIONS FOR USE
(initial release)

RusTech® vacuum tubes for venous blood sampling



2021 г

认字第220019067-001号



兹证明前面上中国专
贸易促进委员会(吕翠莲)
签章和授权的
用的

中华人民共和国外交部
领事司二等秘书
二〇二二年二月十日

吕翠莲



02002995



Консульский отдел Посольства Российской Федерации
в КНР удостоверяет подлинность предстоящей подписи
в КНР уполномоченного представителя МИД КНР
на основании Консульского департамента МИД КНР
серийный номер 973
2022г.



Головань М.В.

Zhejiang Gongdong Medical Technology Co. Ltd.

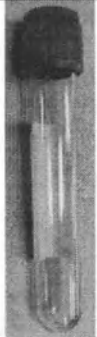
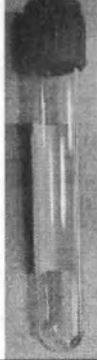
**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
(первоначальный выпуск)**

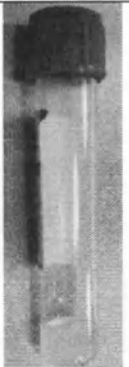
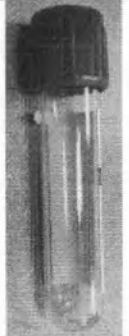
Пробирки вакуумные RusTech® для взятия венозной крови

2021 г

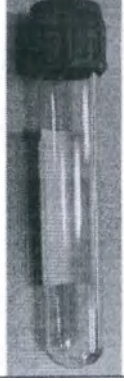
Наименование

Пробирки вакуумные RusTech® для взятия венозной крови:

Наименование пункта	Перечень каталожных номеров	Фотографии
1. Пробирки вакуумные RusTech® с активатором свертывания, 13x75 мм, 13x100 мм, 16x100 мм; 1.5 мл, 2 мл, 2.5 мл, 3 мл, 3.5 мл, 4 мл, 5 мл, 6 мл, 7 мл, 8 мл, 8.5 мл, 9 мл (код вида 293570)	GD015CA, GD020CA, GD025CA, GD030CA, GD035CA, GD040CA, GD045CA, GD050CA, GD060CA, GD070CA, GD080CA, GD085CA, GD090CA	
2. Пробирки вакуумные RusTech® с активатором свертывания и разделительным гелем, 13x75 мм, 13x100 мм, 16x100 мм; 2.5 мл, 3 мл, 3.5 мл, 4 мл, 5 мл, 7 мл, 8 мл (код вида 293640)	GD025SG, GD030SGC, GD035SGC, GD040SGC, GD050SG, GD070SGC, GD080SGC	
3. Пробирки вакуумные RusTech® с тромбином, 13x75 мм, 13x100 мм, 16x100 мм; 1.5 мл, 2 мл, 2.5 мл, 3 мл, 3.5 мл, 4 мл, 5 мл, 6 мл, 7 мл, 8 мл, 8.5 мл, 9 мл (код вида 293700)	GD015CAT, GD020CAT, GD025CAT, GD030CAT, GD035CAT, GD040CAT, GD045CAT, GD050CAT, GD060CAT, GD070CAT, GD080CAT, GD085CAT, GD090CAT	
4. Пробирки вакуумные RusTech® с тромбином и разделительным гелем, 13x75 мм, 13x100 мм, 16x100 мм; 2.5 мл, 3 мл, 3.5 мл, 4 мл, 5 мл, 7 мл, 8 мл (код вида 293780)	GD025SGT, GD030SGT, GD035SGT, GD040SGT, GD050SGT, GD070SGT, GD080SGT	
5. Пробирки вакуумные RusTech® с литий гепарином, 13x75 мм, 13x100 мм, 16x100 мм; 1.5 мл, 2 мл, 2.5 мл, 3 мл, 3.5 мл, 4 мл, 5 мл, 6 мл, 7 мл, 8 мл, 8.5 мл, 9 мл (код вида 293760)	GD015LH, GD020LH, GD025LH, GD030LH, GD035LH, GD040LH, GD050LH, GD060LH, GD070LH, GD080LH, GD085LH, GD090LH	

Наименование пункта	Перечень каталожных номеров	Фотографии
6. Пробирки вакуумные RusTech® с литий гепарином и разделительным гелем, 13x75 мм, 13x100 мм, 16x100 мм; 2.5 мл, 3 мл, 3.5 мл, 4 мл, 5 мл, 7 мл, 8 мл (код вида 293480)	GD025LHG, GD030LHG, GD035LHG, GD040LHG, GD050LHG, GD070LHG, GD080LHG	
7. Пробирки вакуумные RusTech® с натрий гепарином, 13x75 мм, 13x100 мм, 16x100 мм; 1.5 мл, 2 мл, 2.5 мл, 3 мл, 3.5 мл, 4 мл, 5 мл, 6 мл, 7 мл, 8 мл, 8.5 мл, 9 мл (код вида 293420)	GD015SH, GD020SH, GD025SH, GD030SH, GD035SH, GD040SH, GD045SH, GD050SH, GD060SH, GD070SH, GD080SH, GD085SH, GD090SH	
8. Пробирки вакуумные RusTech® с натрий гепарином и разделительным гелем, 13x75 мм, 13x100 мм, 16x100 мм; 2.5 мл, 3 мл, 3.5 мл, 4 мл, 5 мл, 7 мл, 8 мл (код вида 293590)	GD025SHG, GD030SHG, GD035SHG, GD040SHG, GD050SHG, GD070SHG, GD080SHG	
9. Пробирки вакуумные RusTech® с K2ЭДТА, 13x75 мм, 13x100 мм, 16x100 мм; 1.5 мл, 2 мл, 2.5 мл, 3 мл, 3.5 мл, 4 мл, 5 мл, 6 мл, 7 мл, 8 мл, 9 мл (код вида 293500)	GD015EK2, GD020EK2, GD025EK2, GD030EK2, GD035EK2, GD040EK2, GD045EK2, GD050EK2, GD060EK2, GD070EK2, GD080EK2, GD090EK2	
10. Пробирки вакуумные RusTech® с K2ЭДТА и разделительным гелем, 13x75 мм, 13x100 мм, 16x100 мм; 2.5 мл, 3 мл, 3.5 мл, 4 мл, 5 мл, 7 мл, 8 мл (код вида 293630)	GD025EK2G, GD030EK2G, GD035EK2G, GD040EK2G, GD050EK2G, GD070EK2G, GD080EK2G	

Наименование пункта	Перечень каталожных номеров	Фотографии
11. Пробирки вакуумные RusTech® с КЗЭДТА, 13x75 мм, 13x100 мм, 16x100 мм; 1.5 мл, 2 мл, 2.5 мл, 3 мл, 3.5 мл, 4 мл, 5 мл, 6 мл, 7 мл, 8 мл, 9 мл (код вида 293660)	GD015EK3, GD020EK3, GD025EK3, GD030EK3, GD035EK3, GD040EK3, GD045EK3, GD050EK3, GD060EK3, GD070EK3, GD080EK3, GD090EK3	
12. Пробирки вакуумные RusTech® с КЗЭДТА и разделительным гелем, 13x75 мм, 13x100 мм, 16x100 мм; 2.5 мл, 3 мл, 3.5 мл, 4 мл, 5 мл, 7 мл, 8 мл (код вида 334330)	GD025EK3G, GD030EK3G, GD035EK3G, GD040EK3G, GD050EK3G, GD070EK3G, GD080EK3G	
13. Пробирки вакуумные RusTech® с цитратом натрия 3.2%, 13x75 мм, 13x100 мм, 16x100 мм, 1.8 мл, 2.7 мл, 3.6 мл, 4.5 мл, 5.4 мл, 8.1 мл (код вида 293540)	GD018SC2, GD018SCD2, GD027SC2, GD027SCD2, GD036SC2, GD036SCB2, GD045SC2, GD045SCB2, GD054SC2, GD081SC2	
14. Пробирки вакуумные RusTech® с цитратом натрия 3.8%, 13x75 мм, 13x100 мм, 16x100 мм; 1.8 мл, 2.7 мл, 3.6 мл, 4.5 мл, 5.4 мл (код вида 293540)	GD018SC, GD018SCD, GD027SC, GD027SCD, GD036SC, GD036SCB, GD045SC, GD045SCB, GD054SC	
15. Пробирки вакуумные RusTech® с цитратом натрия 3.8% для измерения СОЭ, 8x120 мм, 9x120мм, 13x75 мм; 1.28 мл, 1.6 мл, 2.4 мл, 3.2 мл (код вида 293710)	GD016SC, GD024SC, GD032SC, GD0128ESR, GD016ESR, GD016ESRN	

Наименование пункта	Перечень каталожных номеров	Фотографии
16. Пробирки вакуумные RusTech® с натрия гепарином и натрия фторидом, 13x75 мм, 13x100 мм; 2 мл, 3 мл, 4 мл, 5 мл (код вида 293600)	GD020SFH, GD030SFH, GD035SFH, GD040SFH, GD050SFH	
17. Пробирки вакуумные RusTech® с Na-2ЭДТА и натрия фторидом, 13x75 мм, 13x100 мм; 2 мл, 3 мл, 4 мл, 5 мл (код вида 293680)	GD020SNA2, GD030SNA2, GD035SNA2, GD040SNA2, GD050SNA2	
18. Пробирки вакуумные RusTech® с калия оксалатом и натрия фторидом, 13x75 мм, 13x100 мм; 2 мл, 3 мл, 4 мл, 5 мл (код вида 293400)	GD020SP, GD030SP, GD035SP, GD040SP, GD050SP	
19. Пробирки вакуумные RusTech® без реагентной добавки, 13x75 мм, 13x100 мм, 16x100 мм; 2 мл, 2.5 мл, 3 мл, 3.5 мл, 4 мл, 5 мл, 6 мл, 7 мл, 8 мл, 8.5 мл, 9 мл (код вида 293370).	GD015A, GD020A, GD025A, GD030A, GD035A, GD040A, GD045A, GD050A, GD060A, GD070A, GD080A, GD085A, GD090A	

Далее по тексту могут использоваться следующие наименования:

Изделие, пробирка, пробирки, пробирки вакуумные, пробирки вакуумные для взятия венозной крови, вакуумные пробирки, контейнер, контейнеры, контейнер вакуумный, контейнеры вакуумные.

Предназначение и использование

Пробирки вакуумные RusTech® предназначены для взятия, хранения, транспортировки и первичной обработки образцов венозной крови для исследования сыворотки, плазмы или цельной крови в клинической лаборатории.

Для одноразового использования в диагностике *In Vitro*.

Описание и принцип действия

Пробирки вакуумные RusTech® представляют собой пробирки (одноразовые контейнеры), содержащие вакуум, созданный производителем в заводских условиях (превакуумные контейнеры). Пробирки производятся из пластика (полиэтилентерфталат / полиэтиленфталат+полипропилен) или стекла.

Стерильность: Внутреннее пространство пробирок стерильно (γ-радиация).

Пробирки вакуумные герметично закрыты крышками.

На внешней боковой стенке пробирки размещена бумажная этикетка.

Принцип действия: поступление конкретного объема венозной крови в вакуумные пробирки происходит за счет определенной степени разреженности воздуха (вакуума), созданной в пробирках в заводских условиях, и, вследствие этого, разности давления в венозном сосуде и вакуумной пробирке.

Пробирки вакуумные для взятия венозной крови содержат добавки (реагенты) согласно требованиям для различных видов лабораторных исследований.

Крышки пробирок вакуумных имеют цветовую кодировку в зависимости от внесенных в пробирку добавок (реагентов).

Добавки (реагенты) и цветовые коды крышек

№ и наименование пункта РУ	Добавки (реагенты)	Получаемый тип анализируемого образца / Рекомендуемые области применения	Цветовая кодировка
1. Пробирки вакуумные RusTech® с активатором свертывания, 13x75 мм, 13x100 мм, 16x100 мм; 1.5 мл, 2 мл, 2.5 мл, 3 мл, 3.5 мл, 4 мл, 5 мл, 6 мл, 7 мл, 8 мл, 8.5 мл, 9 мл, (код вида 293570)	Активатор свертывания SiO ₂ (коагулянт)	Сыворотка крови / Биохимические, иммунохимические и иммунологические исследования сыворотки крови	Красная
2. Пробирки вакуумные RusTech® с активатором свертывания и разделительным гелем, 13x75 мм, 13x100 мм, 16x100 мм; 2.5 мл, 3 мл, 3.5 мл, 4 мл, 5 мл, 7 мл, 8 мл, (код вида 293640)	Активатор свертывания SiO ₂ (коагулянт)+ разделительный гель		Желтая
3. Пробирки вакуумные RusTech® с тромбином, 13x75 мм, 13x100 мм, 16x100 мм; 1.5 мл, 2 мл, 2.5 мл, 3 мл, 3.5 мл, 4 мл, 5 мл, 6 мл, 7 мл, 8 мл, 8.5 мл, 9 мл (код вида 293700)	Тромбин (коагулянт)		Красная
4. Пробирки вакуумные RusTech® с тромбином и разделительным гелем, 13x75 мм, 13x100 мм, 16x100 мм; 2.5 мл, 3 мл, 3.5 мл, 4 мл, 5 мл, 7 мл, 8 мл (код вида 293780)	Тромбин (коагулянт)+ разделительный гель		Желтая
5. Пробирки вакуумные RusTech® с литий гепарином, 13x75 мм, 13x100 мм, 16x100 мм; 1.5 мл, 2 мл, 2.5 мл, 3 мл, 3.5 мл, 4 мл, 5 мл, 6 мл, 7 мл, 8 мл, 8.5 мл, 9 мл (код вида 293760)	Лития гепарин (антикоагулянт)	Гепаринизированная плазма крови / Биохимические, иммунохимические и иммунологические исследования гепаринизированной плазмы крови	Зеленая
6. Пробирки вакуумные RusTech® с литий гепарином и разделительным гелем, 13x75 мм, 13x100 мм, 16x100 мм; 2.5 мл, 3 мл, 3.5 мл, 4 мл, 5 мл, 7 мл, 8 мл, (код вида 293480)	Лития гепарин (антикоагулянт) + разделительный гель		
7. Пробирки вакуумные RusTech® с натрий гепарином, 13x75 мм, 13x100 мм, 16x100 мм; 1.5 мл, 2 мл, 2.5 мл, 3 мл, 3.5 мл, 4 мл, 5 мл, 6 мл, 7 мл, 8 мл, 8.5 мл, 9 мл (код вида 293420)	Натрия гепарин (антикоагулянт)		
8. Пробирки вакуумные RusTech® с натрий гепарином и разделительным гелем, 13x75 мм, 13x100 мм, 16x100 мм; 2.5 мл, 3 мл, 3.5 мл, 4 мл, 5 мл, 7 мл, 8 мл, (код вида 293590)	Натрия гепарин (антикоагулянт) + разделительный гель		
9. Пробирки вакуумные RusTech® с К2ЭДТА, 13x75 мм, 13x100 мм, 16x100 мм; 1.5 мл, 2 мл, 2.5 мл, 3 мл, 3.5 мл, 4 мл, 5 мл, 6 мл, 7 мл, 8 мл, 9 мл (код вида 293500)	ЭДТА К2 (антикоагулянт)	Цельная кровь, стабилизированная ЭДТА / Гематологические, иммунохимические, ПЦР-исследования цельной крови	Фиолетовая (лиловая)
10. Пробирки вакуумные RusTech® с К2ЭДТА и разделительным гелем, 13x75 мм,	ЭДТА К2 (антикоагулянт) + разделительный гель	Плазма крови, стабилизированная ЭДТА /	

Пробирки вакуумные RusTech® для взятия венозной крови
Инструкция по применению

13x100 мм, 16x100 мм; 2.5 мл, 3 мл, 3.5 мл, 4 мл, 5 мл, 7 мл, 8 мл (код вида 293630)		Молекулярные исследования стабилизированной ЭДТА-плазмы крови	
11. Пробирки вакуумные RusTech® с КЗЭДТА, 13x75 мм, 13x100 мм, 16x100 мм; 1.5 мл, 2 мл, 2.5 мл, 3 мл, 3.5 мл, 4 мл, 5 мл, 6 мл, 7 мл, 8 мл, 9 мл, (код вида 293660)	ЭДТА КЗ (антикоагулянт)	Цельная кровь, стабилизированная ЭДТА / Гематологические, иммунохимические, ПЦР-исследования цельной крови	
12. Пробирки вакуумные RusTech® с КЗЭДТА и разделительным гелем, 13x75 мм, 13x100 мм, 16x100 мм; 2.5 мл, 3 мл, 3.5 мл, 4 мл, 5 мл, 7 мл, 8 мл (код вида 334330)	ЭДТА КЗ (антикоагулянт) + разделительный гель	Плазма крови, стабилизированная ЭДТА / Молекулярные исследования стабилизированной ЭДТА-плазмы крови	
13. Пробирки вакуумные RusTech® с цитратом натрия 3.2%, 13x75 мм, 13x100 мм, 16x100 мм, 1.8 мл, 2.7 мл, 3.6 мл, 4.5 мл, 5.4 мл, 8.1 мл (код вида 293540)	Цитрат натрия, 3,2 % раствор (1:9) (антикоагулянт)	Цитратная плазма крови / Коагулологические исследования цитратной плазмы крови	Синяя (голубая)
14. Пробирки вакуумные RusTech® с цитратом натрия 3.8%, 13x75 мм, 13x100 мм, 16x100 мм; 1.8 мл, 2.7 мл, 3.6 мл, 4.5 мл, 5.4 мл (код вида 293540)	Цитрат натрия, 3,8 % раствор (1:9) (антикоагулянт)		
15. Пробирки вакуумные RusTech® с цитратом натрия 3.8% для измерения СОЭ, 8x120 мм, 9x120мм, 13x75 мм; 1.28 мл, 1.6 мл, 2.4 мл, 3.2 мл (код вида 293710)	Цитрат натрия 3,8 % раствор (1:4) (антикоагулянт), СОЭ	Цельная кровь, стабилизированная цитратом / Определение скорости оседания эритроцитов (СОЭ)	Черная
16. Пробирки вакуумные RusTech® с натрия гепарином и натрия фторидом, 13x75 мм, 13x100 мм; 2 мл, 3 мл, 4 мл, 5 мл (код вида 293600)	Натрия фторид (ингибитор гликолиза / стабилизатор уровня глюкозы и лактата) и Натрия гепарин (антикоагулянт)	Плазма крови, стабилизированная по уровню глюкозы и лактата / Исследования содержания глюкозы и лактата в плазме крови	Серая
17. Пробирки вакуумные RusTech® с Na-2ЭДТА и натрия фторидом, 13x75 мм, 13x100 мм; 2 мл, 3 мл, 4 мл, 5 мл (код вида 293680)	Натрия фторид (ингибитор гликолиза / стабилизатор уровня глюкозы и лактата) и Калия оксалат (антикоагулянт)		
18. Пробирки вакуумные RusTech® с калия оксалатом и натрия фторидом, 13x75 мм, 13x100 мм; 2 мл, 3 мл, 4 мл, 5 мл (код вида 293400)	Натрия фторид (ингибитор гликолиза / стабилизатор уровня глюкозы и лактата) + ЭДТА Na2 (антикоагулянт)		
19. Пробирки вакуумные RusTech® без реагентной добавки, 13x75 мм, 13x100 мм, 16x100 мм; 2 мл, 2.5 мл, 3 мл, 3.5 мл, 4 мл, 5 мл, 6 мл, 7 мл, 8 мл, 8.5 мл, 9 мл, (код вида 293370).	Без добавок (пробирки для аликвотирования анализируемого образца)	Анализируемый образец / Виды исследований в зависимости от типа анализируемого образца	Красная

Схематическое изображение пробирки

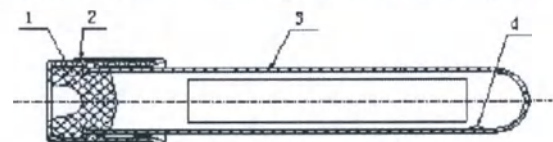


Рисунок изделия (общий вид: 1 - пробка, 2 - пластиковая крышка, 3 - пробирка, 4 – добавка (реагент)).

1.1 Меры предосторожности

- Не используйте вакуумные пробирки с истекшим сроком годности.
- Не используйте вакуумные пробирки при повреждении первичной упаковки.
- Не используйте вакуумные пробирки с повреждениями корпуса пробирки и крышки.
- Не используйте вакуумные пробирки с признаками нарушения герметичности (например, при нестандартном положении крышки).
- Не используйте вакуумные пробирки, в которых присутствуют посторонние вещества.
- Не используйте вакуумные пробирки при изменении в них цвета реагентов (жидкие консерванты и антикоагулянты прозрачные и бесцветные).
- Не храните вакуумные пробирки при температуре равной или ниже 0°C, так как это может привести к повреждению пробирки.

Пробирки вакуумные RusTech® для взятия венозной крови

Инструкция по применению

- Используйте средства индивидуальной защиты (перчатки, маска, халат) во время проведения венопункции.
- Заполняйте объем вакуумной пробирки точно до метки, чтобы не нарушить соотношение крови/реагент.
- Для предотвращения обратного тока крови во время венопункции, который может привести к травмированию пациента, соблюдайте следующие меры предосторожности:
 - а) Опустите руку пациента вниз.
 - б) Держите пробирки крышкой вверх.
- Не переносите образец, взятый с помощью стандартного шприца и иглы типа луэр в вакуумные пробирки, так как эта манипуляция повышает риск контаминации окружающего пространства, травмирования медицинского персонала, развития гемолиза в пробе и получения некачественной пробы.

Состав

Пробирка

Пробирка-варианты исполнения:

- 1) Пробирка со стенками из газонепроницаемого пластика полиэтилентерфталата (ПЭТФ).
- 2) Пробирка со стенками из газонепроницаемого пластика полиэтилентерфталата (ПЭТФ) и полипропилена (ПП).
- 3) Пробирка из стекла.

Крышка

Крышка-варианты исполнения:

- 1) В виде пробки из бутиловой резины (бутилкаучука).
- 2) В виде наружного колпачка, выполненного из полиэтилена (ПЭ), и внутренней пробки из бутиловой резины (бутилкаучука).

Этикетка: бумажная с двойным буквенно-цифровым кодом, один из которых является отрывным.

Срок годности

Срок годности пробирок вакуумных RusTech® для взятия венозной крови составляет 24 месяца с даты производства. Дата окончания срока годности указана на индивидуальной этикетке пробирки, на групповой упаковке и на этикетке транспортной коробки.

Состав комплекта поставки

Пробирки вакуумные RusTech® для взятия венозной крови производства Zhejiang Gongdong Medical Technology Co. Ltd. поставляются по 100 штук. Пробирки установлены в штатив в вертикальном положении.

Штатив, содержащий 100 штук вакуумных пробирок, является минимальной упаковкой.

Штатив герметично запечатан в пластиковую пленку.

Штативы, содержащие 100 штук вакуумных пробирок, упакованы в транспортные картонные коробки.

Транспортная коробка содержит 12 минимальных упаковок, что соответствует количеству пробирок равному 1200 штук.

Транспортные коробки выполнены из гофрированного картона с двойными стенками.

Размеры транспортной коробки:

Для пробирок 13x75 мм: 48*38*20 см

Для пробирок 13x100 мм: 48*38*25 см

Для пробирок 16x100 мм: 51*40*24 см

Упаковка разработана таким образом, что ее конструкция сводит к минимуму возможное нарушение целостности продукта при транспортировке и хранении.

Изделия необходимые для проведения процедуры венопункции, не включенные в состав комплекта поставки

Изделия необходимые для правильного и безопасного применения пробирок вакуумных RusTech® в ходе процесса венопункции, которые не включены в состав комплекта поставки:

- Держатель (Устройства для забора крови RusTech: держатели для игл. Регистрационное удостоверение ФСЗ 2010/08145 от 28.10.2010. Производитель: Zhejiang Gongdong Medical Technology Co.Ltd., Китай)

Пробирки вакуумные RusTech® для взятия венозной крови
Инструкция по применению

- Игла двусторонняя или игла-бабочка с луэр-адаптером на конце катетера, или луэр-адаптер в комплекте с луэр-иглой (Устройства для забора крови RusTech: иглы трубчатые одно- и двусторонние - Регистрационное удостоверение ФСЗ 2010/08145 от 28.10.2010, производитель Zhejiang Gongdong Medical Technology Co.Ltd., Китай; Игла одноразовая стерильная для взятия крови Rustech варианты исполнения: игла двусторонняя, игла двусторонняя с защитным колпачком, игла двусторонняя с визуальной камерой, игла односторонняя с защитным колпачком - Регистрационное удостоверение РЗН 2021/15680 от 29.10.2021, производитель Berpu Medical Technology Co., Ltd., КНР; Устройства для забора крови RusTech: иглы-бабочки - Регистрационное удостоверение ФСЗ 2010/08145 от 28.10.2010, производитель Zhejiang Gongdong Medical Technology Co.Ltd., Китай; Игла одноразовая стерильная для взятия крови Rustech варианты исполнения: игла-"бабочка" с луэр-адаптером, игла-"бабочка" с луэр-адаптером и защитным устройством - Регистрационное удостоверение РЗН 2021/15680 от 29.10.2021, производитель Berpu Medical Technology Co., Ltd., КНР; Устройства для забора крови RusTech: луэр-адаптер - Регистрационное удостоверение ФСЗ 2010/08145 от 28.10.2010, производитель Zhejiang Gongdong Medical Technology Co.Ltd., Китай);
- Манипуляционный столик (изделия производителей, разрешенных к обороту в Российской Федерации);
- Подушечка из влагостойкого материала (изделия производителей, разрешенных к обороту в Российской Федерации);
- Лента со штрих-кодом или лабораторный карандаш (изделия производителей, разрешенных к обороту в Российской Федерации);
- Средства индивидуальной защиты медицинского персонала (перчатки, маска, халат) (изделия производителей, разрешенных к обороту в Российской Федерации);
- Антисептик для обработки рук медицинского персонала (изделия производителей, разрешенных к обороту в Российской Федерации);
- Дезинфицирующее средство для обработки поверхностей (изделия производителей, разрешенных к обороту в Российской Федерации);
- Жгут венозный (все типы и модификации венозных жгутов, разрешенных к обороту в Российской Федерации);
- Стерильные спиртовые салфетки в индивидуальной упаковке или стерильные ватные/марлевые шарики и антисептический раствор для обработки инъекционного поля (изделия производителей, разрешенных к обороту в Российской Федерации);
- Одноразовая марлевая салфетка (изделия производителей, разрешенных к обороту в Российской Федерации);
- Бинт медицинский стерильный (изделия производителей, разрешенных к обороту в Российской Федерации);
- Бактерицидный лейкопластырь (изделия производителей, разрешенных к обороту в Российской Федерации);
- Контейнер для сбора острых и колющих изделий (игл, игл-бабочек, луэр-адаптеров) (изделия производителей, разрешенных к обороту в Российской Федерации);
- Непромокаемый пакет/контейнер для сбора, хранения, транспортировки и утилизации опасных отходов класса Б или В (изделия производителей, разрешенных к обороту в Российской Федерации);
- Штатив для установки пробирок в вертикальном положении (изделия производителей, разрешенных к обороту в Российской Федерации).

Указания по применению

Применяются для проведения венопункции с целью получения проб венозной крови для диагностики *in vitro* в клинических лабораториях в контексте оказания профессиональной медицинской помощи.

Допускается применение только квалифицированным медицинским персоналом, имеющим навыки выполнения данной медицинской услуги.

Указания по взятию образцов

Подготовка к венопункции и взятию крови

- Идентифицируйте пациента, представьтесь, объясните ход и цель процедуры;
- Подготовьте пробирки вакуумные RusTech® для взятия венозной крови содержащие реагенты, соответствующие видам назначенных для конкретного пациента лабораторных исследований; промаркируйте пробирки, указав фамилию и инициалы пациента, его пол, возраст, дату и время взятия крови;
- Проведите гигиеническую обработку рук; осушите;
- Продезинфицируйте руки;

Пробирки вакуумные RusTech® для взятия венозной крови
Инструкция по применению

- Наденьте одноразовые перчатки;
- Выберите, осмотрите и пропальпируйте область предполагаемой венепункции для выявления противопоказаний для избежания возможных осложнений;
- Выберите иглу или иглу-бабочку в соответствии с состоянием сосудов пациента; если выбран вариант иглы/иглы-бабочки несоединенный с держателем, вкрутите выбранную иглу/иглу-бабочку в держатель;
- Наложите жгут на рубашку или пеленку на несколько сантиметров выше места венепункции; максимальное время наложения жгута не более 1 минуты;
- Прозеинфицируйте место венепункции;
- Слегка опустите руку пациента.
- Выполните взятие проб венозной крови в вакуумные пробирки в соответствии с рекомендуемой последовательностью заполнения вакуумных пробирок, содержащих различные реагентные добавки.

Рекомендуемая последовательность заполнения вакуумных пробирок:

1. Вакуумная пробирка без добавок для микробиологических исследований (получение гемокультуры);
2. Вакуумная пробирка с активатором свертывания (коагулянт) для получения сыворотки для клинико-химических и серологических исследований;
3. Вакуумная пробирка с цитратом натрия (антикоагулянт) для получения плазмы для коагулологических исследований;
4. Вакуумная пробирка с солями гепарина (антикоагулянт) для получения плазмы для клинико-химических исследований;
5. Вакуумная пробирка с ЭДТА (антикоагулянт) для получения цельной крови для гематологических исследований, и плазмы для некоторых клинико-химических исследований.

Техника взятия крови

1.

Снимите с колющей части иглы защитный колпачок.

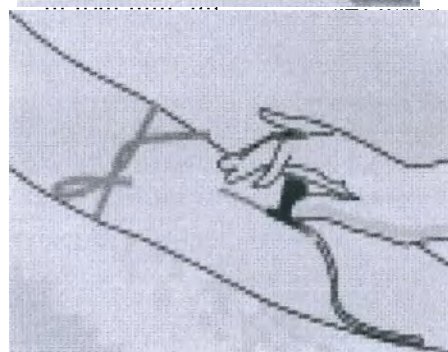


2.

Проведите венепункцию, держа руку пациента опущенной, а пробирку пробкой вверх.

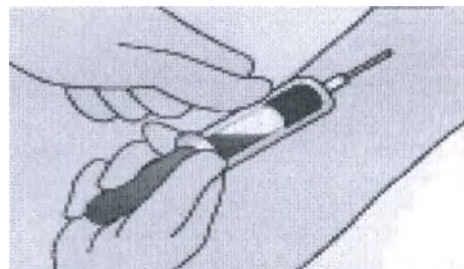
Игла должна располагаться по одной линии с веной скосом вверх под углом 15-30° к коже.

Возьмите вакуумную пробирку RusTech®, установите ее в центр держателя для предотвращения боковых проколов и надавите на дно пробирки так, чтобы игла проколола резиновую пробку крышки вакуумной пробирки.



3.

Как только кровь начнет поступать в пробирку RusTech®, ослабьте жгут.



4.

Когда пробирка наполнится заявленным объемом и ток крови прекратится, извлеките пробирку из держателя.

5.

После отсоединения вакуумной пробирки от иглы аккуратно переверните пробирку 5-8 раз и установите ее в штатив крышкой вверх.

Пробирки нельзя встряхивать. Это может привести к пенообразованию и гемолизу, а также к механическому лизису эритроцитов.



6.

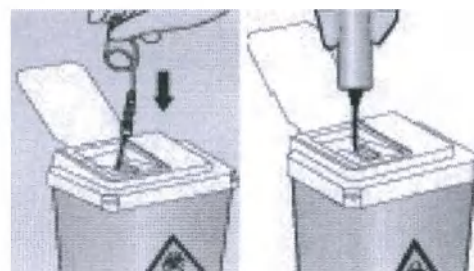
Если процедура сбора образцов крови не завершена, проведите взятие венозной крови в необходимое по лабораторным назначениям количество вакуумных пробирок, соблюдая последовательность наполнения пробирок.

7.

Если процедура сбора образцов крови завершена, извлеките иглу из вены. При использовании иглы-бабочки удерживайте ее за крылышки. Прижмите к месту венепункции стерильный тампон, чтобы остановить кровотечение.

8.

Утилизируйте иглу/иглу-бабочку вместе с держателем согласно принятым в учреждении правилам.



Параметры центрифугирования вакуумных пробирок с образцами крови

Относительная центробежная сила (ОЦС/RCF) $\leq 3000g$, время центрифугирования 10-15 мин.

Рекомендуемые условия центрифугирования:

Изделие	ОЦС (g)*	Время (мин.)*
Пробирки с активатором свертывания/ тромбином	1500-2000	10
Пробирки с активатором свертывания/ тромбином и гелем	2500-3000	10-15
Пробирки с литий гепарином/ натрий гепарином	1500-1800	10
Пробирки с литий гепарином/ натрий гепарином и гелем	2500-3000	10-15
Пробирки с К2ЭДТА/ К3ЭДТА и гелем	2500-3000	10-15
Пробирки с цитратом натрия 3,2%/ 3,8% (получение цитратной плазмы)	1500-2500	15
Пробирки с натрия фторидом	1300-1800	10

*Применение конкретных условий центрифугирования для обеспечения приемлемой эффективности должны оцениваться и утверждаться лабораторией.

Ограничения

- Точное количество забираемой крови может незначительно изменяться в зависимости от высоты над уровнем моря, температуры окружающей среды, атмосферного давления, времени, прошедшего с момента изготовления пробирки, диаметра используемой иглы, венозного давления и вязкости крови пациента.
- Пробирки с большим объемом наполнения могут наполняться быстрее пробирок с меньшим объемом наполнения.

Предупреждения

- 1) Образцы венозной крови, забираемые в вакуумные пробирки, являются потенциально инфицированным биологическим материалом. При работе с образцами крови соблюдайте требования безопасности, предъявляемые при работе с инфицированным биологическим материалом и соответствующие внутренним протоколам, принятым в вашем учреждении.
- 2) Образцы венозной крови, забираемые в вакуумные пробирки, являются потенциально инфицированным биологическим материалом и должны утилизироваться как инфицированные медицинские отходы.
- 3) Вакуумные пробирки предназначены для одноразового использования, попытка повторного использования может вызвать серьезный риск заражения и неточные результаты исследований.
- 4) Не стерилизуйте неиспользованные пробирки.

Пробирки вакуумные RusTech® для взятия венозной крови
Инструкция по применению

- 5) Не используйте пробирки для других целей, кроме заявленного производителем использования.
- 6) Следуйте рекомендациям инструкции производителя. Производитель не несет ответственность за несанкционированное или неквалифицированное использование изделия.
- 7) Взятие и обработка образцов крови должны проводиться подготовленным квалифицированным медицинским персоналом.

Условия транспортировки:

Транспортировать в закрытой транспортной коробке в вертикальном положении при температуре от +4°C до +25°C. Не допускать транспортировку вакуумных пробирок при температуре равной или ниже 0°C.
Относительная влажность: до 80 % без конденсации.

Условия хранения:

Хранить в вертикальном положении в штативе, запечатанном в неповрежденную пленку, при температуре от +4°C до +25°C, вдали от отопительных приборов, избегая воздействия прямых солнечных лучей. Не допускать хранение вакуумных пробирок с жидким наполнителем при температуре равной или ниже 0°C.
Относительная влажность: до 80 % без конденсации.

Условия эксплуатации:

Температура от +4°C до +25°C.
Относительная влажность: до 80 % без конденсации.

Юридическая информация

Официальный производитель медицинского изделия:

Zhejiang Gongdong Medical Technology Co. Ltd. (KHP)
(Жеджианг Гонгдонг Медикал Технолоджи Ко. Лтд.),
10, Beiyuan Ave., Huangyan, Taizhou, Zhejiang, China, 318020
(10, Просп. Бейюан Хуангъян, Тайчжоу, Чжэцзян, Китай, 318020)
Телефон: 0086-576-84115678
Факс: 0086-576-84050789
e-mail: crm@chinagongdong.com

Место производства медицинского изделия:

10, Beiyuan, Ave., Huangyan, Taizhou, Zhejiang, China, 318020
(10, Просп. Бейюан, Хуангъян, Тайчжоу, Чжэцзян, Китай, 318020)

Уполномоченный представитель официального производителя на территории Российской Федерации:

Общество с ограниченной ответственностью «МК РУСТЕК»

119049, г. Москва, ул. Донская, д. 6, стр. 1, помещение 1, оф. 1А, эт. подвал.
Тел: +7 495 984 7392, 506 6785
Факс: +7 495 984 7392
e-mail: info@rustech.ru
сайт: www.rustech.ru

Информация о регистрации медицинского изделия в Российской Федерации:

Регистрационное удостоверение ФСЗ № XXXX/XXXXXX от xx.xx.xxxx г.

Показания

Использование пробирок вакуумных RusTech® показано при необходимости получения проб венозной крови для проведения клинико-диагностического обследования пациента.

Противопоказания

Не применимо для данного медицинского изделия.

Побочные эффекты

Не применимо для данного медицинского изделия.

Технические характеристики

Каталожный номер	Номинальная вместимость (объем крови), мл	Размер пробирки без крышки (диаметр / длина), мм	Материал пробирки	Размер крышки (диаметр / длина), мм	Длина пробирки с крышкой, мм	Вид добавки	Концентрация добавки	Вес пробирки без добавки, г	Вес пробирки с добавкой, г	Цветовая кодировка крышки	Тип крышки	Тип этикетки	Доза радиации, кГр	Срок годности, мес.
	± 10%	±5%		±5%	±5%			± 10%	± 10%					
GD015CA	1,5	13 x 75	ПЭТФ	16,3 / 19,5	81	Активатор свертывания	0,09 мг/мл крови (активатор свертывания)	6,490	6,491	Красная	Внешний пластиковый колпачок с внутренней резиновой пробкой	С одним отрывным буквенно-цифровым кодом	14,8	24
GD020CA	2	13 x 75	ПЭТФ	16,3 / 19,5	81	Активатор свертывания	0,09 мг/мл крови (активатор свертывания)	6,490	6,492	Красная	Внешний пластиковый колпачок с внутренней резиновой пробкой	С одним отрывным буквенно-цифровым кодом	14,8	24
GD025CA	2,5	13 x 75	ПЭТФ	16,3 / 19,5	81	Активатор свертывания	0,09 мг/мл крови (активатор свертывания)	6,490	6,492	Красная	Внешний пластиковый колпачок с внутренней резиновой пробкой	С одним отрывным буквенно-цифровым кодом	14,8	24
GD030CA	3	13 x 75	ПЭТФ	16,3 / 19,5	81	Активатор свертывания	0,09 мг/мл крови (активатор свертывания)	6,490	6,492	Красная	Внешний пластиковый колпачок с внутренней резиновой пробкой	С одним отрывным буквенно-цифровым кодом	14,8	24
GD035CA	3,5	13 x 75	ПЭТФ	16,3 / 19,5	81	Активатор свертывания	0,09 мг/мл крови	6,490	6,492	Красная	Внешний пластиковый колпачок с внутренней резиновой пробкой	С одним отрывным буквенно-цифровым кодом	14,8	24

Пробирки вакуумные RusTech® для взятия венозной крови
Инструкция по применению

Каталожный номер	Номинальная вместимость (объем крови), мл	Размер пробирки без крышки (диаметр / длина), мм	Материал пробирки	Размер крышки (диаметр / длина), мм	Длина пробирки с крышкой, мм	Вид добавки	Концентрация добавки	Вес пробирки без добавки, г	Вес пробирки с добавкой, г	Цветовая кодировка крышки	Тип крышки	Тип этикетки	Доза радиации, кГр	Срок годности, мес.
						я	(активатор свертывания)				й колпачок с внутренней резиновой пробкой	м буквенно-цифровым кодом		
GD040CA	4	13 x 75	ПЭТФ	16,3 / 19,5	81	Активатор свертывания	0,09 мг/мл крови (активатор свертывания)	6,490	6,492	Красная	Внешний пластиковый колпачок с внутренней резиновой пробкой	С одним отрывным буквенно-цифровым кодом	14,8	24
GD045CA	4	13 x 100	ПЭТФ	16,3 / 19,5	106	Активатор свертывания	0,09 мг/мл крови (активатор свертывания)	7,660	7,662	Красная	Внешний пластиковый колпачок с внутренней резиновой пробкой	С одним отрывным буквенно-цифровым кодом	14,8	24
GD050CA	5	13 x 100	ПЭТФ	16,3 / 19,5	106	Активатор свертывания	0,09 мг/мл крови (активатор свертывания)	7,660	7,662	Красная	Внешний пластиковый колпачок с внутренней резиновой пробкой	С одним отрывным буквенно-цифровым кодом	14,8	24
GD060CA	6	13 x 100	ПЭТФ	16,3 / 19,5	106	Активатор свертывания	0,09 мг/мл крови (активатор свертывания)	7,660	7,662	Красная	Внешний пластиковый колпачок с внутренней резиновой пробкой	С одним отрывным буквенно-цифровым кодом	14,8	24

Пробирки вакуумные RusTech® для взятия венозной крови
Инструкция по применению

Каталожный номер	Номинальная вместимость (объем крови), мл	Размер пробирки без крышки (диаметр / длина), мм	Материал пробирки	Размер крышки (диаметр / длина), мм	Длина пробирки с крышкой, мм	Вид добавки	Концентрация добавки	Вес пробирки без добавки, г	Вес пробирки с добавкой, г	Цветовая кодировка крышки	Тип крышки	Тип этикетки	Доза радиации, кГр	Срок годности, мес.
											пробкой	м кодом		
GD070CA	7	16 x 100	ПЭТФ	17,5 / 19,9	107	Активатор свертывания	0,09 мг/мл крови (активатор свертывания)	10,260	10,2607	Красная	Внешний пластиковый колпачок с внутренней резиновой пробкой	С одним отрывным буквенно-цифровым кодом	14,8	24
GD080CA	8	16 x 100	ПЭТФ	17,5 / 19,9	107	Активатор свертывания	0,09 мг/мл крови (активатор свертывания)	10,260	10,2616	Красная	Внешний пластиковый колпачок с внутренней резиновой пробкой	С одним отрывным буквенно-цифровым кодом	14,8	24
GD085CA	8,5	16 x 100	ПЭТФ	17,5 / 19,9	107	Активатор свертывания	0,09 мг/мл крови (активатор свертывания)	10,260	10,2616	Красная	Внешний пластиковый колпачок с внутренней резиновой пробкой	С одним отрывным буквенно-цифровым кодом	14,8	24
GD090CA	9	16 x 100	ПЭТФ	17,5 / 19,9	107	Активатор свертывания	0,09 мг/мл крови (активатор свертывания)	10,260	10,263	Красная	Внешний пластиковый колпачок с внутренней резиновой пробкой	С одним отрывным буквенно-цифровым кодом	14,8	24
GD025SG	2,5	13 x 75	ПЭТФ	16,3 / 19,5	81	Активатор свертывания +	0,09 мг/мл крови (активатор	6,490	7,240	Желтая	Внешний пластиковый колпачок	С одним отрывным	14,8	24

Пробирки вакуумные RusTech® для взятия венозной крови
Инструкция по применению

Каталожный номер	Номинальная вместимость (объем крови), мл	Размер пробирки без крышки (диаметр / длина), мм	Материал пробирки	Размер крышки (диаметр / длина), мм	Длина пробирки с крышкой, мм	Вид добавки	Концентрация добавки	Вес пробирки без добавки, г	Вес пробирки с добавкой, г	Цветовая кодировка крышки	Тип крышки	Тип этикетки	Доза радиации, кГр	Срок годности, мес.
						Разделительный гель	свертывания)				с внутренней резиновой пробкой	буквенно-цифровым кодом		
GD030SGC	3	13 x 75	ПЭТФ	16,3 / 19,5	81	Активатор свертывания + Разделительный гель	0,09 мг/мл крови (активатор свертывания)	6,490	7,240	Желтая	Внешний пластиковый колпачок с внутренней резиновой пробкой	С одним отрывным буквенно-цифровым кодом	14,8	24
GD035SGC	3,5	13 x 75	ПЭТФ	16,3 / 19,5	81	Активатор свертывания + Разделительный гель	0,09 мг/мл крови (активатор свертывания)	6,490	7,240	Желтая	Внешний пластиковый колпачок с внутренней резиновой пробкой	С одним отрывным буквенно-цифровым кодом	14,8	24
GD040SGC	4	13 x 100	ПЭТФ	16,3 / 19,5	106	Активатор свертывания + Разделительный гель	0,09 мг/мл крови (активатор свертывания)	7,660	8,410	Желтая	Внешний пластиковый колпачок с внутренней резиновой пробкой	С одним отрывным буквенно-цифровым кодом	14,8	24
GD050SG	5	13 x 100	ПЭТФ	16,3 / 19,5	106	Активатор свертывания + Разделительный гель	0,09 мг/мл крови (активатор свертывания)	7,660	8,500	Желтая	Внешний пластиковый колпачок с внутренней резиновой пробкой	С одним отрывным буквенно-цифровым кодом	14,8	24

Пробирки вакуумные RusTech® для взятия венозной крови
Инструкция по применению

Каталожный номер	Номинальная вместимость (объем крови), мл	Размер пробирки без крышки (диаметр / длина), мм	Материал пробирки	Размер крышки (диаметр / длина), мм	Длина пробирки с крышкой, мм	Вид добавки	Концентрация добавки	Вес пробирки без добавки, г	Вес пробирки с добавкой, г	Цветовая кодировка крышки	Тип крышки	Тип этикетки	Доза радиации, кГр	Срок годности, мес.
GD070SGC	7	16 x 100	ПЭТФ	17,5 / 19,9	107	Активатор свертывания + Разделительный гель	0,09 мг/мл крови (активатор свертывания)	10,260	11,590	Желтая	Внешний пластиковый колпачок с внутренней резиновой пробкой	С одним отрывным буквенно-цифровым кодом	14,8	24
GD080SGC	8	16 x 100	ПЭТФ	17,5 / 19,9	107	Активатор свертывания + Разделительный гель	0,09 мг/мл крови (активатор свертывания)	10,260	11,590	Желтая	Внешний пластиковый колпачок с внутренней резиновой пробкой	С одним отрывным буквенно-цифровым кодом	14,8	24
GD015CAT	1,5	13 x 75	ПЭТФ	16,3 / 19,5	81	Тромбин	0,09 мг/мл крови (тромбин)	6,490	6,491	Красная	Внешний пластиковый колпачок с внутренней резиновой пробкой	С одним отрывным буквенно-цифровым кодом	14,8	24
GD020CAT	2	13 x 75	ПЭТФ	16,3 / 19,5	81	Тромбин	0,09 мг/мл крови (тромбин)	6,490	6,491	Красная	Внешний пластиковый колпачок с внутренней резиновой пробкой	С одним отрывным буквенно-цифровым кодом	14,8	24
GD025CAT	2,5	13 x 75	ПЭТФ	16,3 / 19,5	81	Тромбин	0,09 мг/мл крови (тромбин)	6,490	6,491	Красная	Внешний пластиковый колпачок с	С одним отрывным буквенно-	14,8	24

Пробирки вакуумные RusTech® для взятия венозной крови
Инструкция по применению

Каталожный номер	Номинальная вместимость (объем крови), мл	Размер пробирки без крышки (диаметр / длина), мм	Материал пробирки	Размер крышки (диаметр / длина), мм	Длина пробирки с крышкой, мм	Вид добавки	Концентрация добавки	Вес пробирки без добавки, г	Вес пробирки с добавкой, г	Цветовая кодировка крышки	Тип крышки	Тип этикетки	Доза радиации, кГр	Срок годности, мес.
											внутренней резиновой пробкой	о-цифровым кодом		
GD030CAT	3	13 x 75	ПЭТФ	16,3 / 19,5	81	Тромбин	0,09 мг/мл крови (тромбин)	6,490	6,491	Красная	Внешний пластиковый колпачок с внутренней резиновой пробкой	С одним отрывным буквенно-цифровым кодом	14,8	24
GD035CAT	3,5	13 x 75	ПЭТФ	16,3 / 19,5	81	Тромбин	0,09 мг/мл крови (тромбин)	6,490	6,491	Красная	Внешний пластиковый колпачок с внутренней резиновой пробкой	С одним отрывным буквенно-цифровым кодом	14,8	24
GD040CAT	4	13 x 75	ПЭТФ	16,3 / 19,5	81	Тромбин	0,09 мг/мл крови (тромбин)	6,490	6,491	Красная	Внешний пластиковый колпачок с внутренней резиновой пробкой	С одним отрывным буквенно-цифровым кодом	14,8	24
GD045CAT	4	13 x 100	ПЭТФ	16,3 / 19,5	106	Тромбин	0,09 мг/мл крови (тромбин)	7,660	7,662	Красная	Внешний пластиковый колпачок с внутренней резиновой пробкой	С одним отрывным буквенно-цифровым кодом	14,8	24
GD050CAT	5	13 x	ПЭТФ	16,3 /	106	Тромбин	0,09 мг/мл	7,660	7,662	Красная	Внешний	С одним	14,8	24

Пробирки вакуумные RusTech® для взятия венозной крови
Инструкция по применению

Каталожный номер	Номинальная вместимость (объем крови), мл	Размер пробирки без крышки (диаметр / длина), мм	Материал пробирки	Размер крышки (диаметр / длина), мм	Длина пробирки с крышкой, мм	Вид добавки	Концентрация добавки	Вес пробирки без добавки, г	Вес пробирки с добавкой, г	Цветовая кодировка крышки	Тип крышки	Тип этикетки	Доза радиации, кГр	Срок годности, мес.
		100		19,5			крови (тромбин)			я	пластиковый колпачок с внутренней резиновой пробкой	отрывным буквенно-цифровым кодом		
GD060CAT	6	13 x 100	ПЭТФ	16,3 / 19,5	106	Тромбин	0,09 мг/мл крови (тромбин)	7,660	7,662	Красная	Внешний пластиковый колпачок с внутренней резиновой пробкой	С одним отрывным буквенно-цифровым кодом	14,8	24
GD070CAT	7	16 x 100	ПЭТФ	17,5 / 19,9	107	Тромбин	0,09 мг/мл крови (тромбин)	10,260	10,263	Красная	Внешний пластиковый колпачок с внутренней резиновой пробкой	С одним отрывным буквенно-цифровым кодом	14,8	24
GD080CAT	8	16 x 100	ПЭТФ	17,5 / 19,9	107	Тромбин	0,09 мг/мл крови (тромбин)	10,260	10,263	Красная	Внешний пластиковый колпачок с внутренней резиновой пробкой	С одним отрывным буквенно-цифровым кодом	14,8	24
GD085CAT	8,5	16 x 100	ПЭТФ	17,5 / 19,9	107	Тромбин	0,09 мг/мл крови (тромбин)	10,260	10,263	Красная	Внешний пластиковый колпачок с внутренней	С одним отрывным буквенно-	14,8	24

Пробирки вакуумные RusTech® для взятия венозной крови
Инструкция по применению

Каталожный номер	Номинальная вместимость (объем крови), мл	Размер пробирки без крышки (диаметр / длина), мм	Материал пробирки	Размер крышки (диаметр / длина), мм	Длина пробирки с крышкой, мм	Вид добавки	Концентрация добавки	Вес пробирки без добавки, г	Вес пробирки с добавкой, г	Цветовая кодировка крышки	Тип крышки	Тип этикетки	Доза радиации, кГр	Срок годности, мес.
											резиновой пробкой	цифровым кодом		
GD090CAT	9	16 x 100	ПЭТФ	17,5 / 19,9	107	Тромбин	0,09 мг/мл крови (тромбин)	10,260	10,263	Красная	Внешний пластиковый колпачок с внутренней резиновой пробкой	С одним отрывным буквенно-цифровым кодом	14,8	24
GD025SGT	2,5	13 x 75	ПЭТФ	16,3 / 19,5	81	Тромбин + Разделительный гель	0,09 мг/мл крови (тромбин)	6,490	7,240	Желтая	Внешний пластиковый колпачок с внутренней резиновой пробкой	С одним отрывным буквенно-цифровым кодом	14,8	24
GD030SGT	3	13 x 75	ПЭТФ	16,3 / 19,5	81	Тромбин + Разделительный гель	0,09 мг/мл крови (тромбин)	6,490	7,240	Желтая	Внешний пластиковый колпачок с внутренней резиновой пробкой	С одним отрывным буквенно-цифровым кодом	14,8	24
GD035SGT	3,5	13 x 75	ПЭТФ	16,3 / 19,5	81	Тромбин + Разделительный гель	0,09 мг/мл крови (тромбин)	6,490	7,240	Желтая	Внешний пластиковый колпачок с внутренней резиновой пробкой	С одним отрывным буквенно-цифровым кодом	14,8	24
GD040SGT	4	13 x 100	ПЭТФ	16,3 / 19,5	106	Тромбин + Разделительный	0,09 мг/мл крови	7,660	8,410	Желтая	Внешний пластиковый	С одним отрывным	14,8	24

Пробирки вакуумные RusTech® для взятия венозной крови
Инструкция по применению

Каталожный номер	Номинальная вместимость (объем крови), мл	Размер пробирки без крышки (диаметр / длина), мм	Материал пробирки	Размер крышки (диаметр / длина), мм	Длина пробирки с крышкой, мм	Вид добавки	Концентрация добавки	Вес пробирки без добавки, г	Вес пробирки с добавкой, г	Цветовая кодировка крышки	Тип крышки	Тип этикетки	Доза радиации, кГр	Срок годности, мес.
						ный гель	(тромбин)				й колпачок с внутренней резиновой пробкой	м буквенно-цифровым кодом		
GD050SGT	5	13 x 100	ПЭТФ	16,3 / 19,5	106	Тромбин + Разделительный гель	0,09 мг/мл крови (тромбин)	7,660	8,500	Желтая	Внешний пластиковый колпачок с внутренней резиновой пробкой	С одним отрывным буквенно-цифровым кодом	14,8	24
GD070SGT	7	16 x 100	ПЭТФ	17,5 / 19,9	107	Тромбин + Разделительный гель	0,09 мг/мл крови (тромбин)	10,260	11,590	Желтая	Внешний пластиковый колпачок с внутренней резиновой пробкой	С одним отрывным буквенно-цифровым кодом	14,8	24
GD080SGT	8	16 x 100	ПЭТФ	17,5 / 19,9	107	Тромбин + Разделительный гель	0,09 мг/мл крови (тромбин)	10,260	11,590	Желтая	Внешний пластиковый колпачок с внутренней резиновой пробкой	С одним отрывным буквенно-цифровым кодом	14,8	24
GD015LH	1,5	13 x 75	ПЭТФ	16,3 / 19,5	81	Литий гепарин	25 МЕ / мл крови (литий гепарин)	6,490	6,491	Зеленая	Внешний пластиковый колпачок с внутренней резиновой	С одним отрывным буквенно-цифровым	14,8	24

Пробирки вакуумные RusTech® для взятия венозной крови
Инструкция по применению

Каталожный номер	Номинальная вместимость (объем крови), мл	Размер пробирки без крышки (диаметр / длина), мм	Материал пробирки	Размер крышки (диаметр / длина), мм	Длина пробирки с крышкой, мм	Вид добавки	Концентрация добавки	Вес пробирки без добавки, г	Вес пробирки с добавкой, г	Цветовая кодировка крышки	Тип крышки	Тип этикетки	Доза радиации, кГр	Срок годности, мес.
											пробкой	м кодом		
GD020LH	2	13 x 75	ПЭТФ	16,3 / 19,5	81	Литий гепарин	25 МЕ / мл крови (литий гепарин)	6,490	6,491	Зеленая	Внешний пластиковый колпачок с внутренней резиновой пробкой	С одним отрывным буквенно-цифровым кодом	14,8	24
GD025LH	2,5	13 x 75	ПЭТФ	16,3 / 19,5	81	Литий гепарин	25 МЕ / мл крови (литий гепарин)	6,490	6,491	Зеленая	Внешний пластиковый колпачок с внутренней резиновой пробкой	С одним отрывным буквенно-цифровым кодом	14,8	24
GD030LH	3	13 x 75	ПЭТФ	16,3 / 19,5	81	Литий гепарин	25 МЕ / мл крови (литий гепарин)	6,490	6,491	Зеленая	Внешний пластиковый колпачок с внутренней резиновой пробкой	С одним отрывным буквенно-цифровым кодом	14,8	24
GD035LH	3,5	13 x 75	ПЭТФ	16,3 / 19,5	81	Литий гепарин	25 МЕ / мл крови (литий гепарин)	6,490	6,491	Зеленая	Внешний пластиковый колпачок с внутренней резиновой пробкой	С одним отрывным буквенно-цифровым кодом	14,8	24
GD040LH	4	13 x 75	ПЭТФ	16,3 / 19,5	81	Литий гепарин	25 МЕ / мл крови (литий гепарин)	6,490	6,491	Зеленая	Внешний пластиковый колпачок с внутренней резиновой пробкой	С одним отрывным буквенно-цифровым кодом	14,8	24

Пробирки вакуумные RusTech® для взятия венозной крови
Инструкция по применению

Каталожный номер	Номинальная вместимость (объем крови), мл	Размер пробирки без крышки и (диаметр / длина), мм	Материал пробирки	Размер крышки (диаметр / длина), мм	Длина пробирки с крышкой, мм	Вид добавки	Концентрация добавки	Вес пробирки без добавки, г	Вес пробирки с добавкой, г	Цветовая кодировка крышки	Тип крышки	Тип этикетки	Доза радиации, кГр	Срок годности, мес.
						гепарин)					с внутренней резиновой пробкой	буквенно-цифровым кодом		
GD040LH	4	13 x 100	ПЭТФ	16,3 / 19,5	106	Литий гепарин	25 МЕ / мл крови (литий гепарин)	7,660	7,662	Зеленая	Внешний пластиковый колпачок с внутренней резиновой пробкой	С одним отрывным буквенно-цифровым кодом	14,8	24
GD050LH	5	13 x 100	ПЭТФ	16,3 / 19,5	106	Литий гепарин	25 МЕ / мл крови (литий гепарин)	7,660	7,662	Зеленая	Внешний пластиковый колпачок с внутренней резиновой пробкой	С одним отрывным буквенно-цифровым кодом	14,8	24
GD060LH	6	13 x 100	ПЭТФ	16,3 / 19,5	106	Литий гепарин	25 МЕ / мл крови (литий гепарин)	7,660	7,662	Зеленая	Внешний пластиковый колпачок с внутренней резиновой пробкой	С одним отрывным буквенно-цифровым кодом	14,8	24
GD070LH	7	16 x 100	ПЭТФ	16,3 / 19,5	107	Литий гепарин	25 МЕ / мл крови (литий гепарин)	7,660	7,662	Зеленая	Внешний пластиковый колпачок с внутренней резиновой пробкой	С одним отрывным буквенно-цифровым кодом	14,8	24

Пробирки вакуумные RusTech® для взятия венозной крови
Инструкция по применению

Каталожный номер	Номинальная вместимость (объем крови), мл	Размер пробирки без крышки (диаметр / длина), мм	Материал пробирки	Размер крышки (диаметр / длина), мм	Длина пробирки с крышкой, мм	Вид добавки	Концентрация добавки	Вес пробирки без добавки, г	Вес пробирки с добавкой, г	Цветовая кодировка крышки	Тип крышки	Тип этикетки	Доза радиации, кГр	Срок годности, мес.
GD080LH	8	16 x 100	ПЭТФ	17,5 / 19,9	107	Литий гепарин	25 МЕ / мл крови (литий гепарин)	10,260	10,263	Зеленая	Внешний пластиковый колпачок с внутренней резиновой пробкой	С одним отрывным буквенно-цифровым кодом	14,8	24
GD085LH	8,5	16 x 100	ПЭТФ	17,5 / 19,9	107	Литий гепарин	25 МЕ / мл крови (литий гепарин)	10,260	10,263	Зеленая	Внешний пластиковый колпачок с внутренней резиновой пробкой	С одним отрывным буквенно-цифровым кодом	14,8	24
GD090LH	9	16 x 100	ПЭТФ	17,5 / 19,9	107	Литий гепарин	25 МЕ / мл крови (литий гепарин)	10,260	10,263	Зеленая	Внешний пластиковый колпачок с внутренней резиновой пробкой	С одним отрывным буквенно-цифровым кодом	14,8	24
GD025LHG	2,5	13 x 75	ПЭТФ	16,3 / 19,5	81	Литий гепарин + Разделительный гель	25 МЕ / мл крови (литий гепарин)	6,490	7,240	Зеленая	Внешний пластиковый колпачок с внутренней резиновой пробкой	С одним отрывным буквенно-цифровым кодом	14,8	24
GD030LHG	3	13 x 75	ПЭТФ	16,3 / 19,5	81	Литий гепарин + Разделительный гель	25 МЕ / мл крови (литий гепарин)	6,490	7,240	Зеленая	Внешний пластиковый колпачок с	С одним отрывным буквенно-	14,8	24

Пробирки вакуумные RusTech® для взятия венозной крови
Инструкция по применению

Каталожный номер	Номинальная вместимость (объем крови), мл	Размер пробирки без крышки и (диаметр / длина), мм	Материал пробирки	Размер крышки (диаметр / длина), мм	Длина пробирки с крышкой, мм	Вид добавки	Концентрация добавки	Вес пробирки без добавки, г	Вес пробирки с добавкой, г	Цветовая кодировка крышки	Тип крышки	Тип этикетки	Доза радиации, кГр	Срок годности, мес.
											внутренней резиновой пробкой	о-цифровым кодом		
GD035LHG	3,5	13 x 75	ПЭТФ	16,3 / 19,5	81	Литий гепарин + Разделительный гель	25 МЕ / мл крови (литий гепарин)	6,490	7,240	Зеленая	Внешний пластиковый колпачок с внутренней резиновой пробкой	С одним отрывным буквенно-цифровым кодом	14,8	24
GD040LHG	4	13 x 100	ПЭТФ	16,3 / 19,5	106	Литий гепарин + Разделительный гель	25 МЕ / мл крови (литий гепарин)	7,660	8,500	Зеленая	Внешний пластиковый колпачок с внутренней резиновой пробкой	С одним отрывным буквенно-цифровым кодом	14,8	24
GD050LHG	5	13 x 100	ПЭТФ	16,3 / 19,5	106	Литий гепарин + Разделительный гель	25 МЕ / мл крови (литий гепарин)	7,660	8,500	Зеленая	Внешний пластиковый колпачок с внутренней резиновой пробкой	С одним отрывным буквенно-цифровым кодом	14,8	24
GD070LHG	7	16 x 100	ПЭТФ	17,5 / 19,9	107	Литий гепарин + Разделительный гель	25 МЕ / мл крови (литий гепарин)	10,260	11,570	Зеленая	Внешний пластиковый колпачок с внутренней резиновой пробкой	С одним отрывным буквенно-цифровым кодом	14,8	24
GD080LHG	8	16 x	ПЭТФ	17,5 /	107	Литий	25 МЕ /	10,260	11,57	Зеленая	Внешний	С одним	14,8	24

Пробирки вакуумные RusTech® для взятия венозной крови
Инструкция по применению

Каталожный номер	Номинальная вместимость (объем крови), мл	Размер пробирки без крышки (диаметр / длина), мм	Материал пробирки	Размер крышки (диаметр / длина), мм	Длина пробирки с крышкой, мм	Вид добавки	Концентрация добавки	Вес пробирки без добавки, г	Вес пробирки с добавкой, г	Цветовая кодировка крышки	Тип крышки	Тип этикетки	Доза радиации, кГр	Срок годности, мес.
		100		19,9		гепарин + Разделительный гель	мл крови (литий гепарин)		0	я	пластиковый колпачок с внутренней резиновой пробкой	отрывным буквенно-цифровым кодом		
GD015SH	1,5	13 x 75	ПЭТФ	16,3 / 19,5	81	Натрия гепарин	25 МЕ / мл крови (натрий гепарин)	6,490	6,491	Зеленая	Внешний пластиковый колпачок с внутренней резиновой пробкой	С одним отрывным буквенно-цифровым кодом	14,8	24
GD020SH	2	13 x 75	ПЭТФ	16,3 / 19,5	81	Натрия гепарин	25 МЕ / мл крови (натрий гепарин)	6,490	6,491	Зеленая	Внешний пластиковый колпачок с внутренней резиновой пробкой	С одним отрывным буквенно-цифровым кодом	14,8	24
GD025SH	2,5	13 x 75	ПЭТФ	16,3 / 19,5	81	Натрия гепарин	25 МЕ / мл крови (натрий гепарин)	6,490	6,491	Зеленая	Внешний пластиковый колпачок с внутренней резиновой пробкой	С одним отрывным буквенно-цифровым кодом	14,8	24
GD030SH	3	13 x 75	ПЭТФ	16,3 / 19,5	81	Натрия гепарин	25 МЕ / мл крови (натрий гепарин)	6,490	6,491	Зеленая	Внешний пластиковый колпачок с внутренней	С одним отрывным буквенно-	14,8	24

Каталожный номер	Номинальная вместимость (объем крови), мл	Размер пробирки без крышки (диаметр / длина), мм	Материал пробирки	Размер крышки (диаметр / длина), мм	Длина пробирки с крышкой, мм	Вид добавки	Концентрация добавки	Вес пробирки без добавки, г	Вес пробирки с добавкой, г	Цветовая кодировка крышки	Тип крышки	Тип этикетки	Доза радиации, кГр	Срок годности, мес.
											резиновой пробкой	цифровым кодом		
GD035SH	3,5	13 x 75	ПЭТФ	16,3 / 19,5	81	Натрия гепарин	25 МЕ / мл крови (натрий гепарин)	6,490	6,491	Зеленая	Внешний пластиковый колпачок с внутренней резиновой пробкой	С одним отрывным буквенно-цифровым кодом	14,8	24
GD040SH	4	13 x 75	ПЭТФ	16,3 / 19,5	81	Натрия гепарин	25 МЕ / мл крови (натрий гепарин)	6,490	6,491	Зеленая	Внешний пластиковый колпачок с внутренней резиновой пробкой	С одним отрывным буквенно-цифровым кодом	14,8	24
GD045SH	4	13 x 100	ПЭТФ	16,3 / 19,5	106	Натрия гепарин	25 МЕ / мл крови (натрий гепарин)	7,662	7,662	Зеленая	Внешний пластиковый колпачок с внутренней резиновой пробкой	С одним отрывным буквенно-цифровым кодом	14,8	24
GD050SH	5	13 x 100	ПЭТФ	16,3 / 19,5	106	Натрия гепарин	25 МЕ / мл крови (натрий гепарин)	7,662	7,662	Зеленая	Внешний пластиковый колпачок с внутренней резиновой пробкой	С одним отрывным буквенно-цифровым кодом	14,8	24
GD060SH	6	13 x 100	ПЭТФ	16,3 / 19,5	106	Натрия гепарин	25 МЕ / мл крови	7,660	7,662	Зеленая	Внешний пластиковый	С одним отрывным	14,8	24

Каталожный номер	Номинальная вместимость (объем крови), мл	Размер пробирки без крышки (диаметр / длина), мм	Материал пробирки	Размер крышки (диаметр / длина), мм	Длина пробирки с крышкой, мм	Вид добавки	Концентрация добавки	Вес пробирки без добавки, г	Вес пробирки с добавкой, г	Цветовая кодировка крышки	Тип крышки	Тип этикетки	Доза радиации, кГр	Срок годности, мес.
							(натрий гепарин)				й колпачок с внутренней резиновой пробкой	м буквенно-цифровым кодом		
GD070SH	7	16 x 100	ПЭТФ	16,3 / 19,9	107	Натрия гепарин	25 МЕ / мл крови (натрий гепарин)	10,260	10,263	Зеленая	Внешний пластиковый колпачок с внутренней резиновой пробкой	С одним отрывным буквенно-цифровым кодом	14,8	24
GD080SH	8	16 x 100	ПЭТФ	17,5 / 19,9	107	Натрия гепарин	25 МЕ / мл крови (натрий гепарин)	10,260	10,263	Зеленая	Внешний пластиковый колпачок с внутренней резиновой пробкой	С одним отрывным буквенно-цифровым кодом	14,8	24
GD085SH	8,5	16 x 100	ПЭТФ	17,5 / 19,9	107	Натрия гепарин	25 МЕ / мл крови (натрий гепарин)	10,260	10,263	Зеленая	Внешний пластиковый колпачок с внутренней резиновой пробкой	С одним отрывным буквенно-цифровым кодом	14,8	24
GD090SH	9	16 x 100	ПЭТФ	17,5 / 19,9	107	Натрия гепарин	25 МЕ / мл крови (натрий гепарин)	10,260	10,263	Зеленая	Внешний пластиковый колпачок с внутренней резиновой	С одним отрывным буквенно-цифровым	14,8	24

Каталожный номер	Номинальная вместимость (объем крови), мл	Размер пробирки без крышки (диаметр / длина), мм	Материал пробирки	Размер крышки (диаметр / длина), мм	Длина пробирки с крышкой, мм	Вид добавки	Концентрация добавки	Вес пробирки без добавки, г	Вес пробирки с добавкой, г	Цветовая кодировка крышки	Тип крышки	Тип этикетки	Доза радиации, кГр	Срок годности, мес.
											пробкой	м кодом		
GD025SHG	2,5	13 x 75	ПЭТФ	16,3 / 19,5	81	Натрия гепарин + Разделительный гель	25 МЕ / мл крови (натрий гепарин)	6,490	7,240	Зеленая	Внешний пластиковый колпачок с внутренней резиновой пробкой	С одним отрывным буквенно-цифровым кодом	14,8	24
GD030SHG	3	13 x 75	ПЭТФ	16,3 / 19,5	81	Натрия гепарин + Разделительный гель	25 МЕ / мл крови (натрий гепарин)	6,490	7,240	Зеленая	Внешний пластиковый колпачок с внутренней резиновой пробкой	С одним отрывным буквенно-цифровым кодом	14,8	24
GD035SHG	3,5	13 x 75	ПЭТФ	16,3 / 19,5	81	Натрия гепарин + Разделительный гель	25 МЕ / мл крови (натрий гепарин)	6,490	7,240	Зеленая	Внешний пластиковый колпачок с внутренней резиновой пробкой	С одним отрывным буквенно-цифровым кодом	14,8	24
GD040SHG	4	13 x 100	ПЭТФ	16,3 / 19,5	106	Натрия гепарин + Разделительный гель	25 МЕ / мл крови (натрий гепарин)	7,660	8,500	Зеленая	Внешний пластиковый колпачок с внутренней резиновой пробкой	С одним отрывным буквенно-цифровым кодом	14,8	24
GD050SHG	5	13 x 100	ПЭТФ	16,3 / 19,5	106	Натрия гепарин + Разделительный	25 МЕ / мл крови (натрий	7,660	8,500	Зеленая	Внешний пластиковый колпачок	С одним отрывным	14,8	24

Каталожный номер	Номинальная вместимость (объем крови), мл	Размер пробирки без крышки и (диаметр / длина), мм	Материал пробирки	Размер крышки (диаметр / длина), мм	Длина пробирки с крышкой, мм	Вид добавки	Концентрация добавки	Вес пробирки без добавки, г	Вес пробирки с добавкой, г	Цветовая кодировка крышки	Тип крышки	Тип этикетки	Доза радиации, кГр	Срок годности, мес.
						ный гель	гепарин)				с внутренней резиновой пробкой	буквенно-цифровым кодом		
GD070SHG	7	16 x 100	ПЭТФ	17,5 / 19,9	107	Натрия гепарин + Разделительный гель	25 МЕ / мл крови (натрий гепарин)	10,260	11,570	Зеленая	Внешний пластиковый колпачок с внутренней резиновой пробкой	С одним отрывным буквенно-цифровым кодом	14,8	24
GD080SHG	8	16 x 100	ПЭТФ	17,5 / 19,9	107	Натрия гепарин + Разделительный гель	25 МЕ / мл крови (натрий гепарин)	10,260	11,570	Зеленая	Внешний пластиковый колпачок с внутренней резиновой пробкой	С одним отрывным буквенно-цифровым кодом	14,8	24
GD015EK3	1,5	13 x 75	ПЭТФ	16,3 / 19,5	81	К3-Этилендиаминтетрауксусная кислота (К3-ЭДТА)	2,0 мг/мл крови (К3-ЭДТА)	6,490	6,493	Лиловая (фиолетовая)	Внешний пластиковый колпачок с внутренней резиновой пробкой	С одним отрывным буквенно-цифровым кодом	14,8	24
GD020EK3	2	13 x 75	ПЭТФ	16,3 / 19,5	81	К3-Этилендиаминтетрауксусная кислота (К3-ЭДТА)	2,0 мг/мл крови (К3-ЭДТА)	6,490	6,494	Лиловая (фиолетовая)	Внешний пластиковый колпачок с внутренней резиновой пробкой	С одним отрывным буквенно-цифровым кодом	14,8	24



Каталожный номер	Номинальная вместимость (объем крови), мл	Размер пробирки без крышки (диаметр / длина), мм	Материал пробирки	Размер крышки (диаметр / длина), мм	Длина пробирки с крышкой, мм	Вид добавки	Концентрация добавки	Вес пробирки без добавки, г	Вес пробирки с добавкой, г	Цветовая кодировка крышки	Тип крышки	Тип этикетки	Доза радиации, кГр	Срок годности, мес.
GD025EK3	2,5	13 x 75	ПЭТФ	16,3 / 19,5	81	К3-Этилендиаминтетрауксая кислота (К3-ЭДТА)	2,0 мг/мл крови (К3-ЭДТА)	6,490	6,495	Лиловая (фиолетовая)	Внешний пластиковый колпачок с внутренней резиновой пробкой	С одним отрывным буквенно-цифровым кодом	14,8	24
GD030EK3	3	13 x 75	ПЭТФ	16,3 / 19,5	81	К3-Этилендиаминтетрауксая кислота (К3-ЭДТА)	2,0 мг/мл крови (К3-ЭДТА)	6,490	6,496	Лиловая (фиолетовая)	Внешний пластиковый колпачок с внутренней резиновой пробкой	С одним отрывным буквенно-цифровым кодом	14,8	24
GD035EK3	3,5	13 x 75	ПЭТФ	16,3 / 19,5	81	К3-Этилендиаминтетрауксая кислота (К3-ЭДТА)	2,0 мг/мл крови (К3-ЭДТА)	6,490	6,497	Лиловая (фиолетовая)	Внешний пластиковый колпачок с внутренней резиновой пробкой	С одним отрывным буквенно-цифровым кодом	14,8	24
GD040EK3	4	13 x 75	ПЭТФ	16,3 / 19,5	81	К3-Этилендиаминтетрауксая кислота (К3-ЭДТА)	2,0 мг/мл крови (К3-ЭДТА)	6,490	6,498	Лиловая (фиолетовая)	Внешний пластиковый колпачок с внутренней резиновой пробкой	С одним отрывным буквенно-цифровым кодом	14,8	24
GD045EK3	4	13 x 100	ПЭТФ	16,3 / 19,5	106	К3-Этилендиаминтетрауксая кислота (К3-ЭДТА)	2,0 мг/мл крови (К3-ЭДТА)	7,660	7,668	Лиловая (фиолетовая)	Внешний пластиковый колпачок с	С одним отрывным буквенно-	14,8	24

Каталожный номер	Номинальная вместимость (объем крови), мл	Размер пробирки без крышки (диаметр / длина), мм	Материал пробирки	Размер крышки (диаметр / длина), мм	Длина пробирки с крышкой, мм	Вид добавки	Концентрация добавки	Вес пробирки без добавки, г	Вес пробирки с добавкой, г	Цветовая кодировка крышки	Тип крышки	Тип этикетки	Доза радиации, кГр	Срок годности, мес.
						кислота (КЗ-ЭДТА)					внутренней резиновой пробкой	о-цифровым кодом		
GD050EK3	5	13 x 100	ПЭТФ	16,3 / 19,5	106	КЗ-Этилендиаминтетрауксая кислота (КЗ-ЭДТА)	2,0 мг/мл крови (КЗ-ЭДТА)	7,660	7,670	Лиловая (фиолетовая)	Внешний пластиковый колпачок с внутренней резиновой пробкой	С одним отрывным буквенно-цифровым кодом	14,8	24
GD060EK3	6	13 x 100	ПЭТФ	16,3 / 19,5	106	КЗ-Этилендиаминтетрауксая кислота (КЗ-ЭДТА)	2,0 мг/мл крови (КЗ-ЭДТА)	7,660	7,672	Лиловая (фиолетовая)	Внешний пластиковый колпачок с внутренней резиновой пробкой	С одним отрывным буквенно-цифровым кодом	14,8	24
GD070EK3	7	16 x 100	ПЭТФ	17,5 / 19,9	107	КЗ-Этилендиаминтетрауксая кислота (КЗ-ЭДТА)	2,0 мг/мл крови (КЗ-ЭДТА)	10,260	10,274	Лиловая (фиолетовая)	Внешний пластиковый колпачок с внутренней резиновой пробкой	С одним отрывным буквенно-цифровым кодом	14,8	24
GD080EK3	8	16 x 100	ПЭТФ	17,5 / 19,9	107	КЗ-Этилендиаминтетрауксая кислота (КЗ-ЭДТА)	2,0 мг/мл крови (КЗ-ЭДТА)	10,260	10,276	Лиловая (фиолетовая)	Внешний пластиковый колпачок с внутренней резиновой пробкой	С одним отрывным буквенно-цифровым кодом	14,8	24
GD090EK3	9	16 x	ПЭТФ	17,5 /	107	КЗ-	2,0 мг/мл	10,260	10,27	Лиловая	Внешний	С одним	14,8	24

Пробирки вакуумные RusTech® для взятия венозной крови
Инструкция по применению

Каталожный номер	Номинальная вместимость (объем крови), мл	Размер пробирки без крышки (диаметр / длина), мм	Материал пробирки	Размер крышки (диаметр / длина), мм	Длина пробирки с крышкой, мм	Вид добавки	Концентрация добавки	Вес пробирки без добавки, г	Вес пробирки с добавкой, г	Цветовая кодировка крышки	Тип крышки	Тип этикетки	Доза радиации, кГр	Срок годности, мес.
		100		19,9		Этилендиаминтетрауксусная кислота (КЗ-ЭДТА)	крови (КЗ-ЭДТА)		8	я (фиолетовая)	пластиковый колпачок с внутренней резиновой пробкой	отрывным буквенно-цифровым кодом		
GD025EK3G	2,5	13 x 75	ПЭТФ	16,3 / 19,5	81	КЗ-Этилендиаминтетрауксусная кислота (КЗ-ЭДТА)+Разделительный гель	2,0 мг/мл крови (КЗ-ЭДТА)	6,490	7,295	Лиловая (фиолетовая)	Внешний пластиковый колпачок с внутренней резиновой пробкой	С одним отрывным буквенно-цифровым кодом	14,8	24
GD030EK3G	3	13 x 75	ПЭТФ	16,3 / 19,5	81	КЗ-Этилендиаминтетрауксусная кислота (КЗ-ЭДТА)+Разделительный гель	2,0 мг/мл крови (КЗ-ЭДТА)	6,490	7,297	Лиловая (фиолетовая)	Внешний пластиковый колпачок с внутренней резиновой пробкой	С одним отрывным буквенно-цифровым кодом	14,8	24
GD035EK3G	3,5	13 x 75	ПЭТФ	16,3 / 19,5	81	КЗ-Этилендиаминтетрауксусная кислота (КЗ-ЭДТА)+Разделительный	2,0 мг/мл крови (КЗ-ЭДТА)	6,490	7,297	Лиловая (фиолетовая)	Внешний пластиковый колпачок с внутренней резиновой пробкой	С одним отрывным буквенно-цифровым кодом	14,8	24

Пробирки вакуумные RusTech® для взятия венозной крови
Инструкция по применению

Каталожный номер	Номинальная вместимость (объем крови), мл	Размер пробирки без крышки (диаметр / длина), мм	Материал пробирки	Размер крышки (диаметр / длина), мм	Длина пробирки с крышкой, мм	Вид добавки	Концентрация добавки	Вес пробирки без добавки, г	Вес пробирки с добавкой, г	Цветовая кодировка крышки	Тип крышки	Тип этикетки	Доза радиации, кГр	Срок годности, мес.
						й гель								
GD040EK3G	4	13 x 100	ПЭТФ	16,3 / 19,5	106	КЗ-Этилендиаминтетрауксая кислота (КЗ-ЭДТА)+Разделительный гель	2,0 мг/мл крови (КЗ-ЭДТА)	7,660	8,468	Лиловая (фиолетовая)	Внешний пластиковый колпачок с внутренней резиновой пробкой	С одним отрывным буквенно-цифровым кодом	14,8	24
GD050EK3G	5	13 x 100	ПЭТФ	16,3 / 19,5	106	КЗ-Этилендиаминтетрауксая кислота (КЗ-ЭДТА)+Разделительный гель	2,0 мг/мл крови (КЗ-ЭДТА)	7,660	8,470	Лиловая (фиолетовая)	Внешний пластиковый колпачок с внутренней резиновой пробкой	С одним отрывным буквенно-цифровым кодом	14,8	24
GD070EK3G	7	16 x 100	ПЭТФ	17,5 / 19,9	107	КЗ-Этилендиаминтетрауксая кислота (КЗ-ЭДТА)+Разделительный гель	2,0 мг/мл крови (КЗ-ЭДТА)	10,260	11,077	Лиловая (фиолетовая)	Внешний пластиковый колпачок с внутренней резиновой пробкой	С одним отрывным буквенно-цифровым кодом	14,8	24
GD080EK3G	8	16 x 100	ПЭТФ	17,5 / 19,9	107	КЗ-Этилендиаминтетрауксая кислота	2,0 мг/мл крови (КЗ-ЭДТА)	10,260	11,077	Лиловая (фиолетовая)	Внешний пластиковый колпачок с	С одним отрывным буквенно-	14,8	24

Пробирки вакуумные RusTech® для взятия венозной крови
Инструкция по применению

Каталожный номер	Номинальная вместимость (объем крови), мл	Размер пробирки без крышки (диаметр / длина), мм	Материал пробирки	Размер крышки (диаметр / длина), мм	Длина пробирки с крышкой, мм	Вид добавки	Концентрация добавки	Вес пробирки без добавки, г	Вес пробирки с добавкой, г	Цветовая кодировка крышки	Тип крышки	Тип этикетки	Доза радиации, кГр	Срок годности, мес.
						кислота (К3-ЭДТА)+Разделительный гель					внутренней резиновой пробкой	о-цифровым кодом		
GD015EK2	1,5	13 x 75	ПЭТФ	16,3 / 19,5	81	К2-Этилендиаминтетрауксая кислота (К2-ЭДТА)	2,0 мг/мл крови (К2-ЭДТА)	6,490	6,493	Лиловая (фиолетовая)	Внешний пластиковый колпачок с внутренней резиновой пробкой	С одним отрывным буквенно-цифровым кодом	14,8	24
GD020EK2	2	13 x 75	ПЭТФ	16,3 / 19,5	81	К2-Этилендиаминтетрауксая кислота (К2-ЭДТА)	2,0 мг/мл крови (К2-ЭДТА)	6,490	6,494	Лиловая (фиолетовая)	Внешний пластиковый колпачок с внутренней резиновой пробкой	С одним отрывным буквенно-цифровым кодом	14,8	24
GD025EK2	2,5	13 x 75	ПЭТФ	16,3 / 19,5	81	К2-Этилендиаминтетрауксая кислота (К2-ЭДТА)	2,0 мг/мл крови (К2-ЭДТА)	6,490	6,494	Лиловая (фиолетовая)	Внешний пластиковый колпачок с внутренней резиновой пробкой	С одним отрывным буквенно-цифровым кодом	14,8	24
GD030EK2	3	13 x 75	ПЭТФ	16,3 / 19,5	81	К2-Этилендиаминтетрауксая кислота (К2-ЭДТА)	2,0 мг/мл крови (К2-ЭДТА)	6,490	6,496	Лиловая (фиолетовая)	Внешний пластиковый колпачок с внутренней резиновой пробкой	С одним отрывным буквенно-цифровым кодом	14,8	24

Пробирки вакуумные RusTech® для взятия венозной крови
Инструкция по применению

Каталожный номер	Номинальная вместимость (объем крови), мл	Размер пробирки без крышки (диаметр / длина), мм	Материал пробирки	Размер крышки (диаметр / длина), мм	Длина пробирки с крышкой, мм	Вид добавки	Концентрация добавки	Вес пробирки без добавки, г	Вес пробирки с добавкой, г	Цветовая кодировка крышки	Тип крышки	Тип этикетки	Доза радиации, кГр	Срок годности, мес.
											пробкой	м кодом		
GD035EK2	3,5	13 x 75	ПЭТФ	16,3 / 19,5	81	K2-Этилендиаминтетрауксая кислота (K2-ЭДТА)	2,0 мг/мл крови (K2-ЭДТА)	6,490	6,496	Лиловая (фиолетовая)	Внешний пластиковый колпачок с внутренней резиновой пробкой	С одним отрывным буквенно-цифровым кодом	14,8	24
GD040EK2	4	13 x 75	ПЭТФ	16,3 / 19,5	81	K2-Этилендиаминтетрауксая кислота (K2-ЭДТА)	2,0 мг/мл крови (K2-ЭДТА)	6,490	6,498	Лиловая (фиолетовая)	Внешний пластиковый колпачок с внутренней резиновой пробкой	С одним отрывным буквенно-цифровым кодом	14,8	24
GD045EK2	4	13 x 100	ПЭТФ	16,3 / 19,5	106	K2-Этилендиаминтетрауксая кислота (K2-ЭДТА)	2,0 мг/мл крови (K2-ЭДТА)	6,490	6,498	Лиловая (фиолетовая)	Внешний пластиковый колпачок с внутренней резиновой пробкой	С одним отрывным буквенно-цифровым кодом	14,8	24
GD050EK2	5	13 x 100	ПЭТФ	16,3 / 19,5	106	K2-Этилендиаминтетрауксая кислота (K2-ЭДТА)	2,0 мг/мл крови (K2-ЭДТА)	6,490	6,500	Лиловая (фиолетовая)	Внешний пластиковый колпачок с внутренней резиновой пробкой	С одним отрывным буквенно-цифровым кодом	14,8	24
GD060EK2	6	13 x 100	ПЭТФ	16,3 / 19,5	106	K2-Этилендиаминтетрауксу	2,0 мг/мл крови (K2-ЭДТА)	7,660	7,672	Лиловая (фиолетовая)	Внешний пластиковый колпачок	С одним отрывным	14,8	24

Каталожный номер	Номинальная вместимость (объем крови), мл	Размер пробирки без крышки (диаметр / длина), мм	Материал пробирки	Размер крышки (диаметр / длина), мм	Длина пробирки с крышкой, мм	Вид добавки	Концентрация добавки	Вес пробирки без добавки, г	Вес пробирки с добавкой, г	Цветовая кодировка крышки	Тип крышки	Тип этикетки	Доза радиации, кГр	Срок годности, мес.
						сняя кислота (K2-ЭДТА)				товая)	с внутренней резиновой пробкой	буквенно-цифровым кодом		
GD070EK2	7	16 x 100	ПЭТФ	17,5 / 19,9	107	K2-Этилендиаминтетрауксусная кислота (K2-ЭДТА)	2,0 мг/мл крови (K2-ЭДТА)	7,660	7,674	Лиловая (фиолетовая)	Внешний пластиковый колпачок с внутренней резиновой пробкой	С одним отрывным буквенно-цифровым кодом	14,8	24
GD080EK2	8	16 x 100	ПЭТФ	17,5 / 19,9	107	K2-Этилендиаминтетрауксусная кислота (K2-ЭДТА)	2,0 мг/мл крови (K2-ЭДТА)	10,260	10,276	Лиловая (фиолетовая)	Внешний пластиковый колпачок с внутренней резиновой пробкой	С одним отрывным буквенно-цифровым кодом	14,8	24
GD090EK2	9	16 x 100	ПЭТФ	17,5 / 19,9	107	K2-Этилендиаминтетрауксусная кислота (K2-ЭДТА)	2,0 мг/мл крови (K2-ЭДТА)	10,260	10,278	Лиловая (фиолетовая)	Внешний пластиковый колпачок с внутренней резиновой пробкой	С одним отрывным буквенно-цифровым кодом	14,8	24
GD025EK2G	2,5	13 x 75	ПЭТФ	16,3 / 19,5	81	K2-Этилендиаминтетрауксусная кислота (K2-ЭДТА)+Раз	2,0 мг/мл крови (K2-ЭДТА)	6,490	7,295	Лиловая (фиолетовая)	Внешний пластиковый колпачок с внутренней резиновой пробкой	С одним отрывным буквенно-цифровым кодом	14,8	24



Каталожный номер	Номинальная вместимость (объем крови), мл	Размер пробирки без крышки и (диаметр / длина), мм	Материал пробирки	Размер крышки (диаметр / длина), мм	Длина пробирки с крышкой, мм	Вид добавки	Концентрация добавки	Вес пробирки без добавки, г	Вес пробирки с добавкой, г	Цветовая кодировка крышки	Тип крышки	Тип этикетки	Доза радиации, кГр	Срок годности, мес.
						делительный гель								
GD030EK2G	3	13 x 75	ПЭТФ	16,3 / 19,5	81	K2-Этилендиаминтетрауксая кислота (K2-ЭДТА)+Разделительный гель	2,0 мг/мл крови (K2-ЭДТА)	6,490	7,297	Лиловая (фиолетовая)	Внешний пластиковый колпачок с внутренней резиновой пробкой	С одним отрывным буквенно-цифровым кодом	14,8	24
GD035EK2G	3,5	13 x 75	ПЭТФ	16,3 / 19,5	81	K2-Этилендиаминтетрауксая кислота (K2-ЭДТА)+Разделительный гель	2,0 мг/мл крови (K2-ЭДТА)	6,490	7,297	Лиловая (фиолетовая)	Внешний пластиковый колпачок с внутренней резиновой пробкой	С одним отрывным буквенно-цифровым кодом	14,8	24
GD040EK2G	4	13 x 100	ПЭТФ	16,3 / 19,5	106	K2-Этилендиаминтетрауксая кислота (K2-ЭДТА)+Разделительный гель	2,0 мг/мл крови (K2-ЭДТА)	7,660	8,468	Лиловая (фиолетовая)	Внешний пластиковый колпачок с внутренней резиновой пробкой	С одним отрывным буквенно-цифровым кодом	14,8	24
GD050EK2G	5	13 x 100	ПЭТФ	16,3 / 19,5	106	K2-Этилендиаминтетрауксу	2,0 мг/мл крови (K2-ЭДТА)	7,660	8,470	Лиловая (фиолетовая)	Внешний пластиковый колпачок	С одним отрывным	14,8	24

Пробирки вакуумные RusTech® для взятия венозной крови
Инструкция по применению

Каталожный номер	Номинальная вместимость (объем крови), мл	Размер пробирки без крышки (диаметр / длина), мм	Материал пробирки	Размер крышки (диаметр / длина), мм	Длина пробирки с крышкой, мм	Вид добавки	Концентрация добавки	Вес пробирки без добавки, г	Вес пробирки с добавкой, г	Цветовая кодировка крышки	Тип крышки	Тип этикетки	Доза радиации, кГр	Срок годности, мес.
						сная кислота (К2-ЭДТА)+Разделительный гель				товая)	с внутренней резиновой пробкой	буквенно-цифровым кодом		
GD070EK2G	7	16 x 100	ПЭТФ	17,5 / 19,9	107	К2-Этилендиаминтетрауксусная кислота (К2-ЭДТА)+Разделительный гель	2,0 мг/мл крови (К2-ЭДТА)	10,260	10,397	Лиловая (фиолетовая)	Внешний пластиковый колпачок с внутренней резиновой пробкой	С одним отрывным буквенно-цифровым кодом	14,8	24
GD080EK2G	8	16 x 100	ПЭТФ	17,5 / 19,9	107	К2-Этилендиаминтетрауксусная кислота (К2-ЭДТА)+Разделительный гель	2,0 мг/мл крови (К2-ЭДТА)	10,260	10,397	Лиловая (фиолетовая)	Внешний пластиковый колпачок с внутренней резиновой пробкой	С одним отрывным буквенно-цифровым кодом	14,8	24
GD018SC2	1,8	13 x 75	ПЭТФ	16,3 / 19,5	81	Цитрат натрия (соотношение с кровью 1:9)	3.2% (0,109 моль/л)	6,490	6,810	Голубая	Внешний пластиковый колпачок с внутренней резиновой пробкой	С одним отрывным буквенно-цифровым кодом	13,9	24
GD027SC2	2,7	13 x 75	ПЭТФ	16,3 /	81	Цитрат	3.2%	6,490	6,810	Голубая	Внешний	С одним	13,9	24

Пробирки вакуумные RusTech® для взятия венозной крови
Инструкция по применению

Каталожный номер	Номинальная вместимость (объем крови), мл	Размер пробирки без крышки (диаметр / длина), мм	Материал пробирки	Размер крышки (диаметр / длина), мм	Длина пробирки с крышкой, мм	Вид добавки	Концентрация добавки	Вес пробирки без добавки, г	Вес пробирки с добавкой, г	Цветовая кодировка крышки	Тип крышки	Тип этикетки	Доза радиации, кГр	Срок годности, мес.
				19,5		натрия (соотношение с кровью 1:9)	(0,109 моль/л)			я	пластиковый колпачок с внутренней резиновой пробкой	отрывным буквенно-цифровым кодом		
GD036SC2	3,6	13 x 75	ПЭТФ	16,3 / 19,5	81	Цитрат натрия (соотношение с кровью 1:9)	3.2% (0,109 моль/л)	6,490	6,810	Голубая	Внешний пластиковый колпачок с внутренней резиновой пробкой	С одним отрывным буквенно-цифровым кодом	13,9	24
GD036SCB2	3,6	13 x 75	Стекло	16,3 / 19,5	81	Цитрат натрия (соотношение с кровью 1:9)	3.2% (0,109 моль/л)	9,000	9,320	Голубая	Внешний пластиковый колпачок с внутренней резиновой пробкой	С одним отрывным буквенно-цифровым кодом	13,9	24
GD045SC2	4,5	13 x 100	ПЭТФ	16,3 / 19,5	107	Цитрат натрия (соотношение с кровью 1:9)	3.2% (0,109 моль/л)	7,660	7,980	Голубая	Внешний пластиковый колпачок с внутренней резиновой пробкой	С одним отрывным буквенно-цифровым кодом	13,9	24
GD045SCB2	4,5	13 x 100	Стекло	16,3 / 19,5	107	Цитрат натрия (соотношение с кровью 1:9)	3.2% (0,109 моль/л)	10,920	11,240	Голубая	Внешний пластиковый колпачок с внутренней	С одним отрывным буквенно-	13,9	24

Каталожный номер	Номинальная вместимость (объем крови), мл	Размер пробирки без крышки (диаметр / длина), мм	Материал пробирки	Размер крышки (диаметр / длина), мм	Длина пробирки с крышкой, мм	Вид добавки	Концентрация добавки	Вес пробирки без добавки, г	Вес пробирки с добавкой, г	Цветовая кодировка крышки	Тип крышки	Тип этикетки	Доза радиации, кГр	Срок годности, мес.
											резиновой пробкой	цифровым кодом		
GD054SC2	5,4	13 x 100	ПЭТФ	16,3 / 19,5	106	Цитрат натрия (соотношение с кровью 1:9)	3.2% (0,109 моль/л)	7,660	7,980	Голубая	Внешний пластиковый колпачок с внутренней резиновой пробкой	С одним отрывным буквенно-цифровым кодом	13,9	24
GD081SC2	8,1	16x 100	ПЭТФ	17,5 / 19,9	107	Цитрат натрия (соотношение с кровью 1:9)	3.2% (0,109 моль/л)	10,260	10,920	Голубая	Внешний пластиковый колпачок с внутренней резиновой пробкой	С одним отрывным буквенно-цифровым кодом	13,9	24
GD018SCD2	1,8	13 x 75	ПЭТФ + полипропилен (двойные стенки)	16,3 / 19,5	81	Цитрат натрия (соотношение с кровью 1:9)	3.2% (0,109 моль/л)	7,690	7,700	Голубая	Внешний пластиковый колпачок с внутренней резиновой пробкой	С одним отрывным буквенно-цифровым кодом	13,9	24
GD027SCD2	2,7	13 x 75	ПЭТФ + полипропилен (двойные стенки)	16,3 / 19,5	81	Цитрат натрия (соотношение с кровью 1:9)	3.2% (0,109 моль/л)	7,690	7,700	Голубая	Внешний пластиковый колпачок с внутренней резиновой пробкой	С одним отрывным буквенно-цифровым кодом	13,9	24
GD018SC	1,8	13 x 75	ПЭТФ	16,3 / 19,5	81	Цитрат натрия	3.8% (0,129 моль/л)	6,490	6,810	Голубая	Внешний пластиковый колпачок с внутренней резиновой пробкой	С одним отрывным буквенно-цифровым кодом	13,9	24

Пробирки вакуумные RusTech® для взятия венозной крови
Инструкция по применению

Каталожный номер	Номинальная вместимость (объем крови), мл	Размер пробирки без крышки (диаметр / длина), мм	Материал пробирки	Размер крышки (диаметр / длина), мм	Длина пробирки с крышкой, мм	Вид добавки	Концентрация добавки	Вес пробирки без добавки, г	Вес пробирки с добавкой, г	Цветовая кодировка крышки	Тип крышки	Тип этикетки	Доза радиации, кГр	Срок годности, мес.
						(соотношение с кровью 1:9)	моль/л)				й колпачок с внутренней резиновой пробкой	м буквенно-цифровым кодом		
GD027SC	2,7	13 x 75	ПЭТФ	16,3 / 19,5	81	Цитрат натрия (соотношение с кровью 1:9)	3.8% (0,129 моль/л)	6,490	6,810	Голубая	Внешний пластиковый колпачок с внутренней резиновой пробкой	С одним отрывным буквенно-цифровым кодом	13,9	24
GD036SC	3,6	13 x 75	ПЭТФ	16,3 / 19,5	81	Цитрат натрия (соотношение с кровью 1:9)	3.8% (0,129 моль/л)	6,490	6,810	Голубая	Внешний пластиковый колпачок с внутренней резиновой пробкой	С одним отрывным буквенно-цифровым кодом	13,9	24
GD036SCB	3,6	13 x 75	Стекло	16,3 / 19,5	81	Цитрат натрия (соотношение с кровью 1:9)	3.8% (0,129 моль/л)	9,000	9,320	Голубая	Внешний пластиковый колпачок с внутренней резиновой пробкой	С одним отрывным буквенно-цифровым кодом	13,9	24
GD045SC	4,5	13 x 100	ПЭТФ	16,3 / 19,5	106	Цитрат натрия (соотношение с кровью 1:9)	3.8% (0,129 моль/л)	7,660	7,980	Голубая	Внешний пластиковый колпачок с внутренней резиновой	С одним отрывным буквенно-цифровым	13,9	24

Пробирки вакуумные RusTech® для взятия венозной крови
Инструкция по применению

Каталожный номер	Номинальная вместимость (объем крови), мл	Размер пробирки без крышки (диаметр / длина), мм	Материал пробирки	Размер крышки (диаметр / длина), мм	Длина пробирки с крышкой, мм	Вид добавки	Концентрация добавки	Вес пробирки без добавки, г	Вес пробирки с добавкой, г	Цветовая кодировка крышки	Тип крышки	Тип этикетки	Доза радиации, кГр	Срок годности, мес.
											пробкой	м кодом		
GD045SCB	4,5	13 x 100	Стекло	16,3 / 19,5	106	Цитрат натрия (соотношение с кровью 1:9)	3.8% (0,129 моль/л)	10,920	11,240	Голубая	Внешний пластиковый колпачок с внутренней резиновой пробкой	С одним отрывным буквенно-цифровым кодом	13,9	24
GD054SC	5,4	13 x 100	ПЭТФ	16,3 / 19,5	106	Цитрат натрия (соотношение с кровью 1:9)	3.8% (0,129 моль/л)	7,660	7,980	Голубая	Внешний пластиковый колпачок с внутренней резиновой пробкой	С одним отрывным буквенно-цифровым кодом	13,9	24
GD018SCD	1,8	13 x 75	ПЭТФ + полипропилен (двойные стенки)	16,3 / 19,5	81	Цитрат натрия (соотношение с кровью 1:9)	3.8% (0,129 моль/л)	7,690	7,700	Голубая	Внешний пластиковый колпачок с внутренней резиновой пробкой	С одним отрывным буквенно-цифровым кодом	13,9	24
GD027SCD	2,7	13 x 75	ПЭТФ + полипропилен (двойные стенки)	16,3 / 19,5	81	Цитрат натрия (соотношение с кровью 1:9)	3.8% (0,129 моль/л)	7,690	7,700	Голубая	Внешний пластиковый колпачок с внутренней резиновой пробкой	С одним отрывным буквенно-цифровым кодом	13,9	24
GD016SC	1,6	13 x 75	ПЭТФ	16,3 / 19,5	81	Цитрат натрия (соотношен	3.8% (0,129 моль/л)	6,490	6,920	Черная	Внешний пластиковый колпачок	Стандартная без отрывно	13,9	24

Пробирки вакуумные RusTech® для взятия венозной крови
Инструкция по применению

Каталожный номер	Номинальная вместимость (объем крови), мл	Размер пробирки без крышки (диаметр / длина), мм	Материал пробирки	Размер крышки (диаметр / длина), мм	Длина пробирки с крышкой, мм	Вид добавки	Концентрация добавки	Вес пробирки без добавки, г	Вес пробирки с добавкой, г	Цветовая кодировка крышки	Тип крышки	Тип этикетки	Дозировка, кГр	Срок годности, мес.
						не с кровью 1:4)					с внутренней резиновой пробкой	го цифрового кода		
GD024SC	2,4	13 x 75	ПЭТФ	16,3 / 19,5	81	Цитрат натрия (соотношение с кровью 1:4)	3.8% (0,129 моль/л)	6,490	6,920	Черная	Внешний пластиковый колпачок с внутренней резиновой пробкой	Стандартная без отрывного цифрового кода	13,9	24
GD032SC	3,2	13 x 75	ПЭТФ	16,3 / 19,5	81	Цитрат натрия (соотношение с кровью 1:4)	3.8% (0,129 моль/л)	6,490	6,920	Черная	Внешний пластиковый колпачок с внутренней резиновой пробкой	Стандартная без отрывного цифрового кода	13,9	24
GD0128ESR	1,28	8 x 120	Стекло	12,72 / 15,21	124	Цитрат натрия (соотношение с кровью 1:4)	3.8% (0,129 моль/л)	7,840	8,080	Черная	Резиновая пробка	Стандартная без отрывного цифрового кода	13,9	24
GD016ESR	1,6	8 x 120	Стекло	12,72 / 15,21	124	Цитрат натрия (соотношение с кровью 1:4)	3.8% (0,129 моль/л)	7,840	8,080	Черная	Резиновая пробка	Стандартная без отрывного цифрового кода	13,9	24
GD016ESRN	1,6	9 x 120	Стекло	12,72 / 15,21	124	Цитрат натрия	3.8% (0,129	7,840	8,080	Черная	Резиновая пробка	Стандартная без	13,9	24

Пробирки вакуумные RusTech® для взятия венозной крови
Инструкция по применению

Каталожный номер	Номинальная вместимость (объем крови), мл	Размер пробирки без крышки (диаметр / длина), мм	Материал пробирки	Размер крышки (диаметр / длина), мм	Длина пробирки с крышкой, мм	Вид добавки	Концентрация добавки	Вес пробирки без добавки, г	Вес пробирки с добавкой, г	Цветовая кодировка крышки	Тип крышки	Тип этикетки	Доза радиации, кГр	Срок годности, мес.
						(соотношение с кровью 1:4)	моль/л)					отрывного цифрового кода		
GD020SFH	2	13 x 75	ПЭТФ	16,3 / 19,5	81	Натрия фторид + натрия гепарин (NaF + Na-гепарин)	3 мг/мл крови (NaF)	6,490	6,496	Серая	Внешний пластиковый колпачок с внутренней резиновой пробкой	С одним отрывным буквенно-цифровым кодом	14,8	24
GD030SFH	3	13 x 75	ПЭТФ	16,3 / 19,5	81	Натрия фторид + натрия гепарин (NaF + Na-гепарин)	3 мг/мл крови (NaF)	6,490	6,499	Серая	Внешний пластиковый колпачок с внутренней резиновой пробкой	С одним отрывным буквенно-цифровым кодом	14,8	24
GD035SFH	3	13 x 100	ПЭТФ	16,3 / 19,5	81	Натрия фторид + натрия гепарин (NaF + Na-гепарин)	3 мг/мл крови (NaF)	7,660	7,671	Серая	Внешний пластиковый колпачок с внутренней резиновой пробкой	С одним отрывным буквенно-цифровым кодом	14,8	24
GD040SFH	4	13 x 75	ПЭТФ	16,3 / 19,5	81	Натрия фторид + натрия гепарин (NaF + Na-гепарин)	3 мг/мл крови (NaF)	6,490	6,502	Серая	Внешний пластиковый колпачок с внутренней резиновой пробкой	С одним отрывным буквенно-цифровым кодом	14,8	24

Пробирки вакуумные RusTech® для взятия венозной крови
Инструкция по применению

Каталожный номер	Номинальная вместимость (объем крови), мл	Размер пробирки без крышки (диаметр / длина), мм	Материал пробирки	Размер крышки (диаметр / длина), мм	Длина пробирки с крышкой, мм	Вид добавки	Концентрация добавки	Вес пробирки без добавки, г	Вес пробирки с добавкой, г	Цветовая кодировка крышки	Тип крышки	Тип этикетки	Доза радиации, кГр	Срок годности, мес.
GD050SFH	5	13 x 100	ПЭТФ	16,3 / 19,5	106	Натрия фторид + натрия гепарин (NaF + Na-гепарин)	3 мг/мл крови (NaF)	7,660	7,677	Серая	Внешний пластиковый колпачок с внутренней резиновой пробкой	С одним отрывным буквенно-цифровым кодом	14,8	24
GD020SNA2	2	13 x 75	ПЭТФ	16,3 / 19,5	81	Натрия фторид + Na2-этилендиаминтетрауксусная кислота (NaF + Na2-ЭДТА)	3 мг/мл крови (NaF) + 2мг/мл крови (Na2-ЭДТА)	6,490	6,500	Серая	Внешний пластиковый колпачок с внутренней резиновой пробкой	С одним отрывным буквенно-цифровым кодом	14,8	24
GD030SNA2	3	13 x 75	ПЭТФ	16,3 / 19,5	81	Натрия фторид + Na2-этилендиаминтетрауксусная кислота (NaF + Na2-ЭДТА)	3 мг/мл крови (NaF) + 2мг/мл крови (Na2-ЭДТА)	6,490	6,505	Серая	Внешний пластиковый колпачок с внутренней резиновой пробкой	С одним отрывным буквенно-цифровым кодом	14,8	24
GD035SNA2	3	13 x 100	ПЭТФ	16,3 / 19,5	106	Натрия фторид + Na2-этилендиаминтетрауксусная кислота	3 мг/мл крови (NaF) + 2мг/мл крови (Na2-ЭДТА)	7,660	7,678	Серая	Внешний пластиковый колпачок с внутренней резиновой пробкой	С одним отрывным буквенно-цифровым кодом	14,8	24

Каталожный номер	Номинальная вместимость (объем крови), мл	Размер пробирки без крышки (диаметр / длина), мм	Материал пробирки	Размер крышки (диаметр / длина), мм	Длина пробирки с крышкой, мм	Вид добавки	Концентрация добавки	Вес пробирки без добавки, г	Вес пробирки с добавкой, г	Цветовая кодировка крышки	Тип крышки	Тип этикетки	Доза радиации, кГр	Срок годности, мес.
						(NaF + Na ₂ -ЭДТА)								
GD040SNA2	4	13 x 75	ПЭТФ	16,3 / 19,5	81	Натрия фторид + Na ₂ -этилендиаминтетрауксусная кислота (NaF + Na ₂ -ЭДТА)	3 мг/мл крови (NaF) + 2мг/мл крови (Na ₂ -ЭДТА)	6,490	6,510	Серая	Внешний пластиковый колпачок с внутренней резиновой пробкой	С одним отрывным буквенно-цифровым кодом	14,8	24
GD050SNA2	5	13 x 100	ПЭТФ	16,3 / 19,5	106	Натрия фторид + Na ₂ -этилендиаминтетрауксусная кислота (NaF + Na ₂ -ЭДТА)	3 мг/мл крови (NaF) + 2мг/мл крови (Na ₂ -ЭДТА)	7,660	7,688	Серая	Внешний пластиковый колпачок с внутренней резиновой пробкой	С одним отрывным буквенно-цифровым кодом	14,8	24
GD020SP	2	13 x 75	ПЭТФ	16,3 / 19,5	81	Натрия фторид + калия оксалат (NaF + K-оксалат)	3 мг/мл крови (NaF)	6,490	6,500	Серая	Внешний пластиковый колпачок с внутренней резиновой пробкой	С одним отрывным буквенно-цифровым кодом	14,8	24
GD030SP	3	13 x 75	ПЭТФ	16,3 / 19,5	81	Натрия фторид + калия оксалат (NaF + K-	3 мг/мл крови (NaF)	6,490	6,505	Серая	Внешний пластиковый колпачок с внутренней	С одним отрывным буквенно-	14,8	24

Каталожный номер	Номинальная вместимость (объем крови), мл	Размер пробирки без крышки (диаметр / длина), мм	Материал пробирки	Размер крышки (диаметр / длина), мм	Длина пробирки с крышкой, мм	Вид добавки	Концентрация добавки	Вес пробирки без добавки, г	Вес пробирки с добавкой, г	Цветовая кодировка крышки	Тип крышки	Тип этикетки	Доза радиации, кГр	Срок годности, мес.
						оксалат)					резиновой пробкой	цифровым кодом		
GD035SP	3	13 x 100	ПЭТФ	16,3 / 19,5	106	Натрия фторид + калия оксалат (NaF + K-оксалат)	3 мг/мл крови (NaF)	7,660	7,678	Серая	Внешний пластиковый колпачок с внутренней резиновой пробкой	С одним отрывным буквенно-цифровым кодом	14,8	24
GD040SP	4	13 x 75	ПЭТФ	16,3 / 19,5	81	Натрия фторид + калия оксалат (NaF + K-оксалат)	3 мг/мл крови (NaF)	6,490	6,510	Серая	Внешний пластиковый колпачок с внутренней резиновой пробкой	С одним отрывным буквенно-цифровым кодом	14,8	24
GD050SP	5	13 x 100	ПЭТФ	16,3 / 19,5	106	Натрия фторид + калия оксалат (NaF + K-оксалат)	3 мг/мл крови (NaF)	7,660	7,688	Серая	Внешний пластиковый колпачок с внутренней резиновой пробкой	С одним отрывным буквенно-цифровым кодом	14,8	24
GD015A	1,5	13 x 75	ПЭТФ	16,3 / 19,5	81	Без добавок	—	6,490	—	Красная	Внешний пластиковый колпачок с внутренней резиновой пробкой	С одним отрывным буквенно-цифровым кодом	14,8	24
GD020A	2	13 x 75	ПЭТФ	16,3 / 19,5	81	Без добавок	—	6,490	—	Красная	Внешний пластиковый колпачок с внутренней резиновой пробкой	С одним отрывным буквенно-цифровым кодом	14,8	24

Каталожный номер	Номинальная вместимость (объем крови), мл	Размер пробирки без крышки (диаметр / длина), мм	Материал пробирки	Размер крышки (диаметр / длина), мм	Длина пробирки с крышкой, мм	Вид добавки	Концентрация добавки	Вес пробирки без добавки, г	Вес пробирки с добавкой, г	Цветовая кодировка крышки	Тип крышки	Тип этикетки	Доза радиации, кГр	Срок годности, мес.
											й колпачок с внутренней резиновой пробкой	м буквенно-цифровым кодом		
GD025A	2,5	13 x 75	ПЭТФ	16,3 / 19,5	81	Без добавок	—	6,490	—	Красная	Внешний пластиковый колпачок с внутренней резиновой пробкой	С одним отрывным буквенно-цифровым кодом	14,8	24
GD030A	3	13 x 75	ПЭТФ	16,3 / 19,5	81	Без добавок	—	6,490	—	Красная	Внешний пластиковый колпачок с внутренней резиновой пробкой	С одним отрывным буквенно-цифровым кодом	14,8	24
GD035A	3,5	13 x 75	ПЭТФ	16,3 / 19,5	81	Без добавок	—	6,490	—	Красная	Внешний пластиковый колпачок с внутренней резиновой пробкой	С одним отрывным буквенно-цифровым кодом	14,8	24
GD040A	4	13 x 75	ПЭТФ	16,3 / 19,5	81	Без добавок	—	6,490	—	Красная	Внешний пластиковый колпачок с внутренней резиновой пробкой	С одним отрывным буквенно-цифровым кодом	14,8	24

Пробирки вакуумные RusTech® для взятия венозной крови
Инструкция по применению

Каталожный номер	Номинальная вместимость (объем крови), мл	Размер пробирки без крышки и (диаметр / длина), мм	Материал пробирки	Размер крышки (диаметр / длина), мм	Длина пробирки с крышкой, мм	Вид добавки	Концентрация добавки	Вес пробирки без добавки, г	Вес пробирки с добавкой, г	Цветовая кодировка крышки	Тип крышки	Тип этикетки	Доза радиации, кГр	Срок годности, мес.
											пробкой	м кодом		
GD045A	4	13 x 100	ПЭТФ	16,3 / 19,5	106	Без добавок	—	7,660	—	Красная	Внешний пластиковый колпачок с внутренней резиновой пробкой	С одним отрывным буквенно-цифровым кодом	14,8	24
GD050A	5	13 x 100	ПЭТФ	16,3 / 19,5	106	Без добавок	—	7,660	—	Красная	Внешний пластиковый колпачок с внутренней резиновой пробкой	С одним отрывным буквенно-цифровым кодом	14,8	24
GD060A	6	13 x 100	ПЭТФ	16,3 / 19,5	106	Без добавок	—	7,660	—	Красная	Внешний пластиковый колпачок с внутренней резиновой пробкой	С одним отрывным буквенно-цифровым кодом	14,8	24
GD070A	7	16 x 100	ПЭТФ	17,5 / 19,9	107	Без добавок	—	10,260	—	Красная	Внешний пластиковый колпачок с внутренней резиновой пробкой	С одним отрывным буквенно-цифровым кодом	14,8	24
GD080A	8	16 x 100	ПЭТФ	17,5 / 19,9	107	Без добавок	—	10,260	—	Красная	Внешний пластиковый колпачок	С одним отрывным	14,8	24

Пробирки вакуумные RusTech® для взятия венозной крови
Инструкция по применению

Каталожный номер	Номинальная вместимость (объем крови), мл	Размер пробирки без крышки и (диаметр / длина), мм	Материал пробирки	Размер крышки (диаметр / длина), мм	Длина пробирки с крышкой, мм	Вид добавки	Концентрация добавки	Вес пробирки без добавки, г	Вес пробирки с добавкой, г	Цветовая маркировка крышки	Тип крышки	Тип этикетки	Доза радиации, кГр	Срок годности, мес.
											с внутренней резиновой пробкой	буквенно-цифровым кодом		
GD085A	8,5	16 x 100	ПЭТФ	17,5 / 19,9	107	Без добавок	—	10,260	—	Красная	Внешний пластиковый колпачок с внутренней резиновой пробкой	С одним отрывным буквенно-цифровым кодом	14,8	24
GD090A	9	16 x 100	ПЭТФ	17,5 / 19,9	107	Без добавок	—	10,260	—	Красная	Внешний пластиковый колпачок с внутренней резиновой пробкой	С одним отрывным буквенно-цифровым кодом	14,8	24

Информация о наличии в медицинском изделии лекарственного средства для медицинского применения, материалов животного и (или) человеческого происхождения
Не применимо для данного медицинского изделия.

Информация о потенциальных потребителях медицинского изделия

Для профессионального применения.

Пробирки вакуумные RusTech® для взятия венозной крови предназначены для применения только квалифицированным обученным медицинским персоналом - специалистами, имеющими диплом установленного образца об окончании среднего профессионального медицинского образовательного учебного учреждения по специальностям: "лечебное дело", "сестринское дело", "акушерское дело", специалистами, имеющими диплом установленного образца об окончании высшего профессионального медицинского образовательного учебного учреждения по специальности «лечебное дело».

Перечень международных нормативов/стандартов, которым соответствует медицинское изделие для диагностики *in vitro*

ГОСТ ISO 6710-2011 Контейнеры для сбора образцов венозной крови одноразовые. Технические требования и методы испытаний.

ГОСТ Р ИСО 15223-1-2020 Изделия медицинские символы, применяемые при маркировке медицинских изделий, на этикетках и в сопроводительной документации. Часть 1. Основные требования.

ISO 13485:2016 «Изделия медицинские. Системы менеджмента качества. Руководство по применению».

«Директива 98/79/EC (1998) «Медицинские средства и оборудование для лабораторной диагностики *in vitro*».

MDD 93/42/EEC «Директива 93/42/EEC от 14 июня 1993 г по медицинским изделиям».

EN-ISO14971:2012 «Медицинские изделия - Применение управления рисками к медицинским изделиям».

BS EN ISO 15223-1:2016 «Медицинские изделия. Графические символы, используемые при маркировке медицинских изделий, маркировка и информация, которая должна быть предоставлена. Общие требования».

BS EN 1041: 2008+A1:2013 «Предоставление информации производителем медицинских изделий».

BS EN14820:2004 (E) «Контейнеры одноразовые для сбора образцов венозной крови человека».

BS ISO 11137-1-2015 «Стерилизация медицинской продукции. Радиационная стерилизация. Часть 1: Требования к разработке, валидации и текущему контролю процесса стерилизации медицинских изделий».

ENISO11607-1-2019 «Упаковка для медицинских изделий, подлежащих финишной стерилизации».

EN ISO 10993-1:2009/AC:2010 «Биологическая оценка медицинских изделий. Часть 1: Оценка и испытания в процессе управления рисками».

Информация о типе анализируемого образца

Пробирки вакуумные RusTech® используются для взятия венозной крови и получения образцов сыворотки, плазмы или цельной крови после преаналитической подготовки, которые являются анализируемыми образцами в условиях клинично-диагностических лабораторий. Это изделия для диагностики *in vitro*.

Список используемых символов

Символы	Значение
Кат.№	Каталожный номер (артикул) изделия
Кол-во	Количество изделия в групповой упаковке в штуках
	Номер серии (код партии)
	Дата изготовления
	Срок годности (Использовать до...) Не использовать после истечения срока годности
	Не использовать при повреждении упаковки

	Запрет на повторное применение
	Обратитесь к инструкции по применению
	Производитель Zhejiang Gongdong Medical Technology Co., Ltd. No.10 Beiyuan Ave., Economic Development Zone, Huangyan, Taizhou, China, 318020
	Маркировка соответствия требованиям CE
	Медицинское изделие для диагностики <i>in vitro</i>
	Медицинское изделие
	Радиационная стерилизация
	Температурный диапазон
	Не допускать воздействия солнечного света
	Беречь от влаги
	Верх. Указывает правильное вертикальное положение груза
	Не замораживать
	Хрупкое, обращаться осторожно

Требования к техническому обслуживанию и ремонту медицинского изделия
Не применимо для данного медицинского изделия

Материалы медицинского изделия

Пробирка: полиэтилентерфталат (ПЭТФ), полипропилен (ПП), стекло.

Крышка: бутиловая резина (бутилкаучук), полиэтилен (ПЭ).

Полный список материалов представлен в Техническом файле.

Удаление и уничтожение отходов

Утилизация использованных пробирок вакуумных осуществляется в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями по обращению с медицинскими отходами согласно СанПиН 2.1.3684-21 и СанПиН 3.3686-21, и внутренними протоколами, принятыми в лечебном учреждении.

Рекламации

Порядок предъявления рекламаций и ответов на них регулируется гражданским правом. Рекламация может предъявляться только по таким вопросам, которые не являлись предметом приемки товара, произведенной в соответствии с условиями договора.

По всем вопросам, связанным с использованием изделия, необходимо обратиться к Уполномоченному представителю производителя.

В случае рекламации обращаться к производителю и/или уполномоченному представителю производителя.

Штрих-код:

220019067-001 1/2 (8)

E D C

25.02.2022

СЕРТИФИКАТ

ССРП

Китайский комитет содействия развитию международной торговли

Китайский комитет содействия развитию международной торговли
Китайская палата международной торговли

**Китайский комитет содействия развитию международной торговли
Китайская палата международной торговли**

СЕРТИФИКАТ

№ 221100B0/005397

Настоящим подтверждается, что печать ZHEJIANG GONGDONG MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD. / ЧЖЕЦЗЯН ГУНДУН МЕДИКАЛ ТЕКНОЛОДЖИ КО., ЛТД на прикрепленном ДОКУМЕНТЕ является подлинной.

**Китайский комитет содействия развитию
международной торговли**

**Подпись уполномоченного лица: Лю
Цуйлянь**

Дата: 28 января 2022 г.

**Печать: Китайский комитет содействия
развитию международной торговли**

Сертификация

**Специальная печать для коммерческих
свидетельств**

ССРПТ

Веб-сайт для проверки сертификата: <http://www.rzccpit.com/validate.html>

Номер сбоку: 01094495

/Подпись/ Ши Хуэй Ян

Должность: руководитель

/Подпись/ Ин Шуан

Должность: руководитель отдела продаж

Дата: 30.12.2021

Штамп компании:

ZHEJIANG GONGDONG MEDICAL

TECHNOLOGY CO., LTD. / ЧЖЕЦЗЯН

ГУНДУН МЕДИКАЛ ТЕКНОЛОДЖИ КО.,

ЛТД.

Zhejiang Gongdong Medical Technology Co. Ltd. /

Чжецзян Гундун Медикал Текнолоджи Ко., Лтд.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

(Первоначальный выпуск)

Пробирки вакуумные RusTech® для взятия образцов венозной крови

Фрагмент печати: Китайский комитет содействия развитию международной торговли/ Сертификация / Специальная печать для коммерческих свидетельств / ССРПТ

Перевод с китайского языка на русский язык

Штамп компании: ZHEJIANG GONGDONG MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD. / ЧЖЕЦЗЯН ГУНДУН МЕДИКАЛ ТЕКНОЛОДЖИ КО., ЛТД.

Легализационная наклейка:

Регистрационный номер наклейки: 220019067-001

Настоящим подтверждается подлинность подписи г-на Лю Цуйлянь,
Нотариуса Китайской Комиссии Содействия Международной Торговли

/Подпись/

Министерство Иностранных Дел КНР

Дата: 11.02.2022

Номер под штрих- кодом внизу: 02002995

Круглая печать:

Министерство Иностранных Дел КНР, Департамент легализации

ПОДПИСЬ

Российская Федерация

Город Москва

Тринадцатого мая две тысячи двадцать второго года

Я, Дейнеко Людмила Валериевна, временно исполняющая обязанности нотариуса города Москвы Прокошенковой Елены Евгеньевны, свидетельствую подлинность подписи переводчика Яйлоян Давида Георгиевича.

Подпись сделана в моем присутствии.

Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: № 21/86-н/77-2022- 26 2022

Уплачено за совершение нотариального действия: 400 руб. 00 коп.

ПОДПИСЬ

Гербовая печать
нотариуса г. Москвы
Прокошенковой Е.Е.

Гербовая печать
нотариуса г. Москвы
Прокошенковой Е.Е.

Л.В. Дейнеко

Всего прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью 62 лист(-а,-ов).

ПОДПИСЬ



Л.В. Дейнеко

Российская Федерация

Город Москва

Тринадцатого мая две тысячи двадцать второго года

Я, Дейнеко Людмила Валериевна, временно исполняющая обязанности нотариуса города Москвы Прокошенковой Елены Евгеньевны, свидетельствую верность копии с представленного мне документа.

Зарегистрировано в реестре: № 21/86-н/77-2022- 26 2020

Уплачено за совершение нотариального действия: 3720 руб. 00 коп.

Л.В. Дейнеко

Всего прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью 61 лист(-а,-ов).

Л.В. Дейнеко