

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

«Контрольный раствор глюкозы Contour Next («Контур Некст») для системы измерения уровня глюкозы в крови Contour Care», варианты исполнения»

Производитель:

Асцензия Диабитис Кеа Холдингс АГ, Швейцария (Ascensia Diabetes Care Holdings AG)

2022

1. Контрольный раствор глюкозы Contour Next («Контур Некст») для системы измерения уровня глюкозы в крови Contour Care, низкая концентрация / высокая концентрация, в составе:

1) Контрольный раствор глюкозы низкой концентрации Contour Next («Контур Некст») Low 2,5 мл – 1 шт.

2) Контрольный раствор глюкозы высокой концентрации Contour Next («Контур Некст») High 2,5 мл – 1 шт.


Картонная коробка:






LOT 0BVG02
2022-06



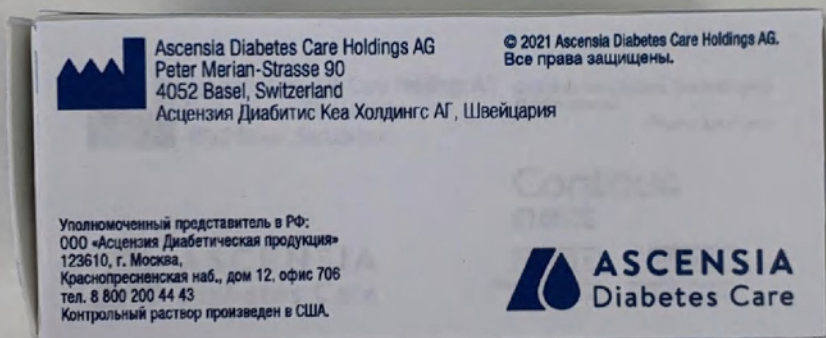

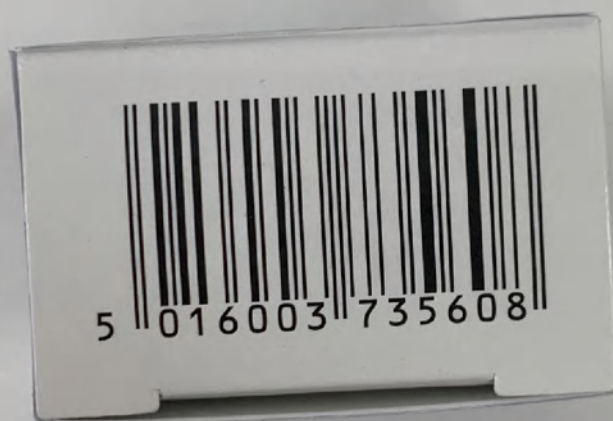

Флаконы:





2) Инструкция по применению – 1 шт.

Contour next КОНТУР НЕКСТ

Контрольный раствор глюкозы Contour Next (Контур Некст) для системы измерения уровня глюкозы в крови Contour Care, варианты использования

Для использования
с тест-полосками
Contour Care («Контур Кеа»)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед каждым использованием встряхните флакон с контрольным раствором

- не менее 15 раз.
- Использование не перемешанного контрольного раствора может привести к неточным результатам.
- Не калибруйте систему измерения уровня глюкозы в крови по результатам контрольного тестирования.
- Не рассчитывайте бонус на основании результатов контрольного тестирования.

Назначение: Контрольные растворы Contour Next («Контур Некст») – это водные растворы глюкозы, предназначенные для проверки качества полученных результатов при самостоятельном измерении уровня глюкозы в крови людьми с диабетом и медицинскими работниками. Контрольные растворы используются совместно с системой Contour Care («Контур Кеа») тест-полосками Contour Care («Контур Кеа») и глюкометром Contour Care («Контур Кеа»). Контрольные растворы могут использоваться взрослыми и детьми от 2-х лет (взрослые могут проводить тестирование у детей с 2-х лет). Контрольные растворы являются вспомогательным средством в *in vitro* диагностике.

Краткая информация: Эти контрольные растворы содержат определенное количество глюкозы.

Необходимо проведение контрольного теста:

- при первом использовании глюкометра;
- при открытии нового флакона или упаковки тест-полосок;
- при подозрении на неправильную работу глюкометра;
- при неоднократном получении неожиданных результатов измерения уровня глюкозы в крови.

Всегда советуйтесь с врачом, прежде чем переходить на другие лекарства по результатам анализа с помощью глюкометра Contour Care («Контур Кеа»).

Условия хранения и обращения:

- **Храните** контрольные растворы при температуре от 8°C до 30°C.
- Если глюкометр или тест-полоски подвергнуты резкому перепаду температуры, подождите 20 минут, чтобы они адаптировались к новой температуре, прежде чем проводить контрольный тест.
- **Рабочий диапазон температур контрольного тестирования на глюкометрах Contour Care («Контур Кеа») составляет от 15°C до 35°C.**
- Запрещено использовать контрольный раствор после истечения срока годности, указанного на этикетке флакона и на коробке, а также по истечении шести месяцев со дня вскрытия флакона. Мы рекомендуем вам для напоминания написать дату утилизации, которая наступит через шесть месяцев с момента первого открывания флакона, в отведенном для этого месте на наклейке флакона.
- Проверьте глюкометр на предмет нехватки, повреждения и поломки частей. За запасными частями обращайтесь в Службу по работе с клиентами по тел.: 8 800 200 44 43.

Процедура анализа: Прежде чем проводить проверку с контрольным раствором, прочтите текст инструкции.

ВАЖНО:

- Перед каждым использованием встряхните флакон с контрольным раствором не менее 15 раз.
- Использование не перемешанного контрольного раствора может привести к неточным результатам.

1. Проверьте срок годности контрольного раствора. Срок годности контрольного раствора указан на этикетке флакона. Если срок годности истек, контрольный раствор не использовать. Если срок годности не истек, но контрольный раствор имеет необычный запах, цвет или консистенцию, его также не следует использовать.

2. Проверьте, чтобы контрольный раствор был в пределах рабочего диапазона температур (от 15°C до 35°C). Если температура ниже или выше указанного диапазона, подождите 20 минут, чтобы контрольный раствор адаптировался к температуре, прежде чем проводить контрольный тест.

3. Встряхните флакон с контрольным раствором не менее 15 раз, чтобы перемешать раствор.

4. Непосредственно перед использованием контрольного раствора встряхните флакон еще раз.

5. Непосредственно перед использованием контрольного раствора встряхните флакон еще раз.

6. Немедленно прикоснитесь кончиком тест-полоски к капле контрольного раствора.

7. Держите заборный кончик тест-полоски в капле раствора, пока глюкометр не издаст звуковой сигнал.

8. Утилизируйте использованные тест-полоски как медицинские отходы или в соответствии с рекомендациями вашего медицинского работника.

Результаты анализа: Сравните результаты контрольного теста с контрольными диапазонами, указанными на этикетке флакона с тест-полосками Contour Care («Контур Кеа»).

Сомнительные или нестабильные результаты: Если полученный результат находится за пределами диапазона, указанного на флаконе или коробке с тест-полосками, это может указывать на проблему с тест-полосками, с глюкометром или с методом процедуры. Если результат контрольного теста находится за пределами диапазона, не пользуйтесь глюкометром Contour Care («Контур Кеа») пока не устраните проблему.

Внимательно прочитайте раздел Проверка с контрольным раствором руководства пользователя глюкометра Contour Care («Контур Кеа»).

Важно! Если вам не удается справиться с проблемой, обратитесь в Службу по работе с клиентами по тел.: 8 800 200 44 43.

Информация о безопасности

- Контрольный раствор Contour Next («Контур Некст») предназначен только для диагностики *in vitro*.
- Не глотать и не использовать для инъекций.

Химический состав:

Асценсия Диабетс Кеа Холдингс АГ, Швейцария

Уполномоченный представитель в РФ:

ООО «Асценсия Диабетс Кеа Холдингс», 125610, г. Москва, Краснопресненская наб., дом 12, офис 706

тел.: 8 800 200 44 43

www.diabetes.ascensia.com

Асценсия, логотип Ascensia Diabetes Care и CONTOUR (Контур) являются

товарными знаками и (или) зарегистрированными товарными знаками компании

Ascensia Diabetes Care Holdings AG (Асценсия Диабетс Кеа Холдингс АГ).

© 2022 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Все права защищены.

8000709

ASCENSIA
Diabetes Care


Информацию о патентах и связанных лицензиях см. по адресу: www.patents.ascensia.com

Встряхните 15 раз

CE
2197
Rev. 06/22

2. Контрольный раствор глюкозы Contour Next («Контур Некст») для системы измерения уровня глюкозы в крови Contour Care, нормальная концентрация, в составе:

1) Контрольный раствор глюкозы нормальной концентрации Contour Next («Контур Некст») Normal 2,5 мл – 1 шт.
Картонная коробка:

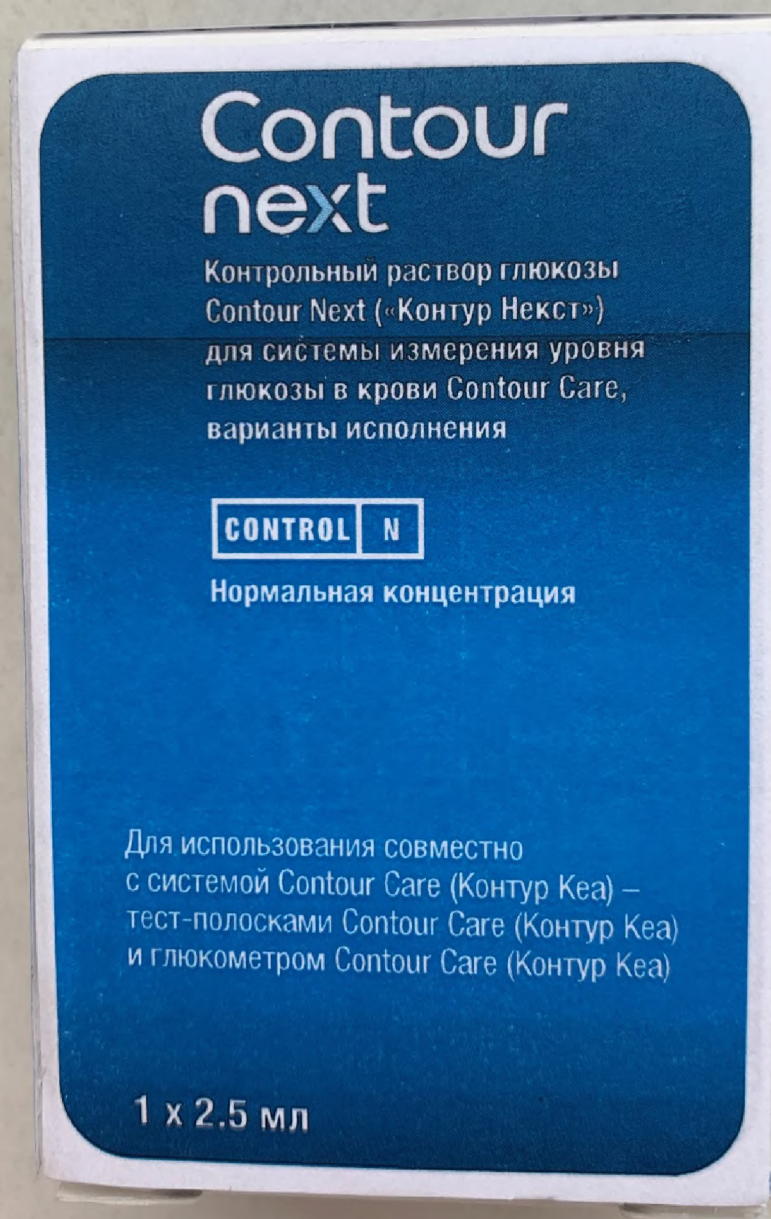



Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Peter Merian-Strasse 90
4052 Basel, Switzerland


Асцензия Диабетис Кеа Холдингс АГ, Швейцария

© 2021 Ascensia Diabetes Care Holdings AG.
Все права защищены.

Уполномоченный представитель в РФ:
ООО «Асцензия Диабетическая продукция»
123610, г. Москва,
Краснопресненская наб., дом 12, офис 706
тел. 8 800 200 44 43
Контрольный раствор произведен в США.



ASCENSIA
Diabetes Care

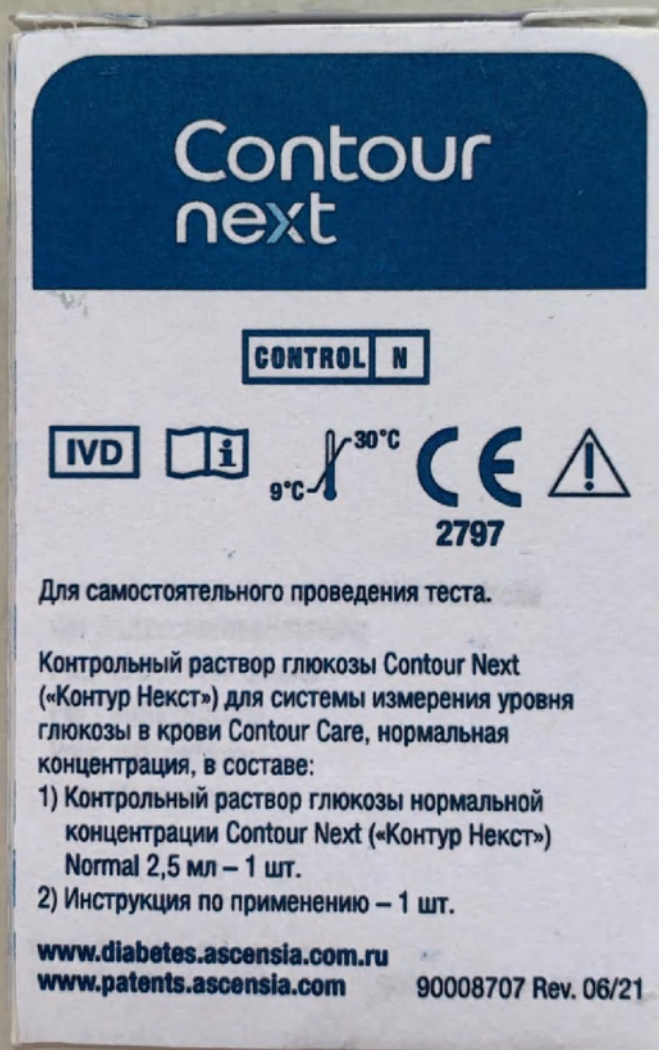

 **1BV2C34**


 **2022-09**





Флакон:



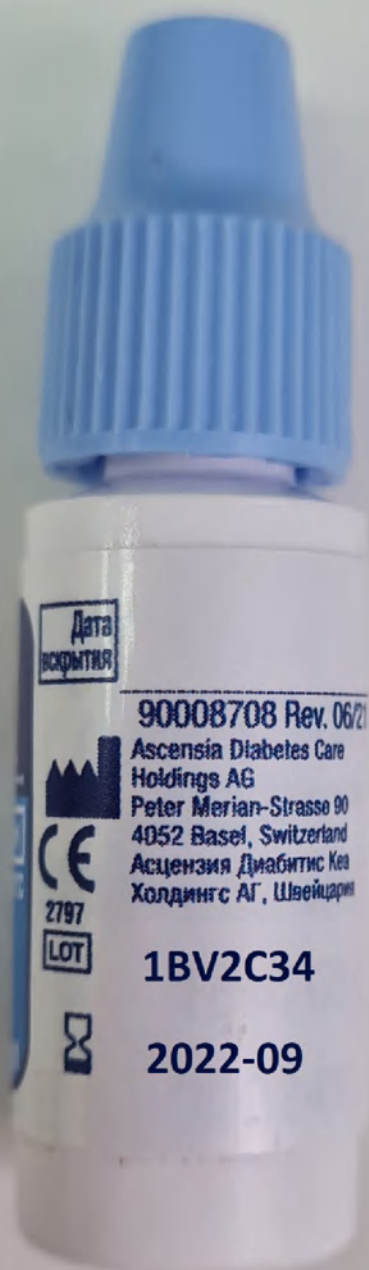

2) Инструкция по применению – 1 шт.:

Contour next КОНТУР НЕКСТ

Контрольный раствор глюкозы Contour Next («Контур Некст») для системы контроля уровня глюкозы в крови Contour Care, включая использование

Для использования с тест-полосками Contour Care («Контур Кеа»)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед каждым использованием встряхните флакон с контрольным раствором не менее 15 раз.

- Использование не перемешанного контрольного раствора может привести к неточным результатам.
- Не калибруйте систему измерения уровня глюкозы в крови по результатам контрольного тестирования.
- Не рассчитывайте баланс на основании результатов контрольного тестирования.

Назначение: Контрольные растворы Contour Next («Контур Некст») – это водные растворы глюкозы, предназначенные для проверки качества полученных результатов при самостоятельном измерении уровня глюкозы в крови людьми с диабетом и медицинскими работниками. Контрольные растворы используются совместно с системой Contour Care («Контур Кеа») (тест-полосками Contour Care («Контур Кеа») и глюкометром Contour Care («Контур Кеа»); Контрольные растворы могут использоваться взрослыми и детьми от 2-х лет (взрослые могут проводить тестирование у детей с 2-х лет). Контрольные растворы являются вспомогательным средством в и/или диагностике.

Краткая информация: Эти контрольные растворы содержат определенное количество глюкозы.

Необходимо проведение контрольного теста:

- при первом использовании глюкометра;
- при открытии нового флакона или упаковки тест-полосок;
- при подозрении на неправильную работу глюкометра;
- при неоднократном получении неожиданных результатов измерения уровня глюкозы в крови.

Всегда советуйтесь с врачом, прежде чем переходить на другие лекарства по результатам анализа с помощью глюкометра CONTOUR CARE (КОНТУР КЕА).

Условия хранения и обращения:

- Храните контрольные растворы при температуре от 0°C до 30°C.
- Если глюкометр и/или тест-полоски подвергнуты резкому перепаду температуры, подождите 20 минут, чтобы они адаптировались к новой температуре, прежде чем проводить контрольный тест.
- Рабочий диапазон температур контрольного тестирования на глюкометрах Contour Care («Контур Кеа») составляет от 15°C до 35°C.
- Запрещено использовать контрольный раствор после истечения срока годности, указанного на этикетке флакона и на коробке, а также по истечении шести месяцев со дня вскрытия флакона. Мы рекомендуем вам для максимального написания даты утилизации, которая наступит через шесть месяцев с момента первого открывания флакона, в отведенном для этого месте на наклейке флакона.
- Посылайте глюкометр на предмет поломки, повреждения и поломки частей. За запасными частями обращайтесь в Службу по работе с клиентами по тел.: 8 800 200 44 43.

Процедура анализа: Прежде чем проводить проверку с контрольным раствором, прочтите руководство пользователя глюкометром Contour Care («Контур Кеа»), содержащее полный текст инструкции.

ВАЖНО:

- Перед каждым использованием встряхните флакон с контрольным раствором не менее 15 раз.
- Использование не перемешанного контрольного раствора может привести к неточным результатам.

- Убедитесь, что вы используете тест-полоски, соответствующие тому, что есть в комплекте поставки или в инструкции.
- Используйте только тест-полоски Contour Care («Контур Кеа») только с контрольным раствором глюкозы Contour Next («Контур Некст»). При использовании другого контрольного раствора результат может оказаться неточным.
- Всегда храните контрольные растворы в оригинальном флаконе с контрольным раствором не менее 15 раз.
- Сколько контрольных растворов и когда использовать, если вы используете тест-полоски Contour Care («Контур Кеа»), смотрите в инструкции.
- Убедитесь, что вы используете контрольный раствор после истечения срока годности, указанного на этикетке флакона и на коробке, а также по истечении шести месяцев со дня вскрытия флакона. Мы рекомендуем вам для максимального написания даты утилизации, которая наступит через шесть месяцев с момента первого открывания флакона, в отведенном для этого месте на наклейке флакона.
- Немедленно прикоснитесь кончиком тест-полоски к капле контрольного раствора.
- Держите заборный кончик тест-полоски в капле раствора, пока глюкометр не издаст звуковой сигнал.
- Утилизуйте использованные тест-полоски как медицинские отходы или в соответствии с рекомендациями вашего медицинского работника.

Результаты анализа: Сравните результаты контрольного теста с тест-полосками Contour Care («Контур Кеа») на этикетке флакона с

Сомнительные или нестабильные результаты: Если полученный результат находится за пределами диапазона, указанного на флаконе или коробке с тест-полосками, это может указывать на проблему с тест-полосками, глюкометром или с контрольным раствором. Если результат контрольного теста находится за пределами диапазона, указанного на флаконе или коробке с тест-полосками, это может указывать на проблему с тест-полосками, глюкометром или с контрольным раствором. Если результат контрольного теста находится за пределами диапазона, указанного на флаконе или коробке с тест-полосками, это может указывать на проблему с тест-полосками, глюкометром или с контрольным раствором.

ВАЖНО! Если вам не удалось справиться с проблемой, обратитесь в Службу по работе с клиентами по тел.: 8 800 200 44 43.

Информация о безопасности:

- Контрольный раствор не содержит инсулина.
- Не глотать и не использовать для инъекций.

Химический состав:	Глюкоза (% вес/объем)	Неактивные Ингредиенты (% вес/объем)
Нормальная концентрация	0,07	99,93
Низкая концентрация	0,03	99,97
Высокая концентрация	0,18	99,82

Диапазон Контроля Нормальной Концентрации
 Диапазон Контроля Низкой Концентрации
 Диапазон Контроля Высокой Концентрации

Ascensia Diabetes Care Holdings AG
 Peter Merian-Strasse 90
 4052 Basel, Switzerland
 Ascensia Diabetes Care Holdings AG, Швейцария

Уполномоченный представитель в РФ:
 ООО «Асценсия Диабетическая продукция»
 125610, г. Москва, Краснопресненская наб., дом 12, офис 706
 тел. 8 800 200 44 43
www.diabetes.ascensia.com


Ascensia, логотип Ascensia Diabetes Care и CONTOUR (Контур) являются товарными знаками и (или) зарегистрированными товарными знаками компании Ascensia Diabetes Care Holdings AG (Асценсия Диабетическая Кеа Холдингс АГ).

© 2022 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Все права защищены.

90008709

3. Контрольный раствор глюкозы Contour Next («Контур Некст») для системы измерения уровня глюкозы в крови Contour Care, низкая концентрация, в составе:

1) Контрольный раствор глюкозы низкой концентрации Contour Next («Контур Некст») Low 2,5 мл – 1 шт.
Картонная коробка

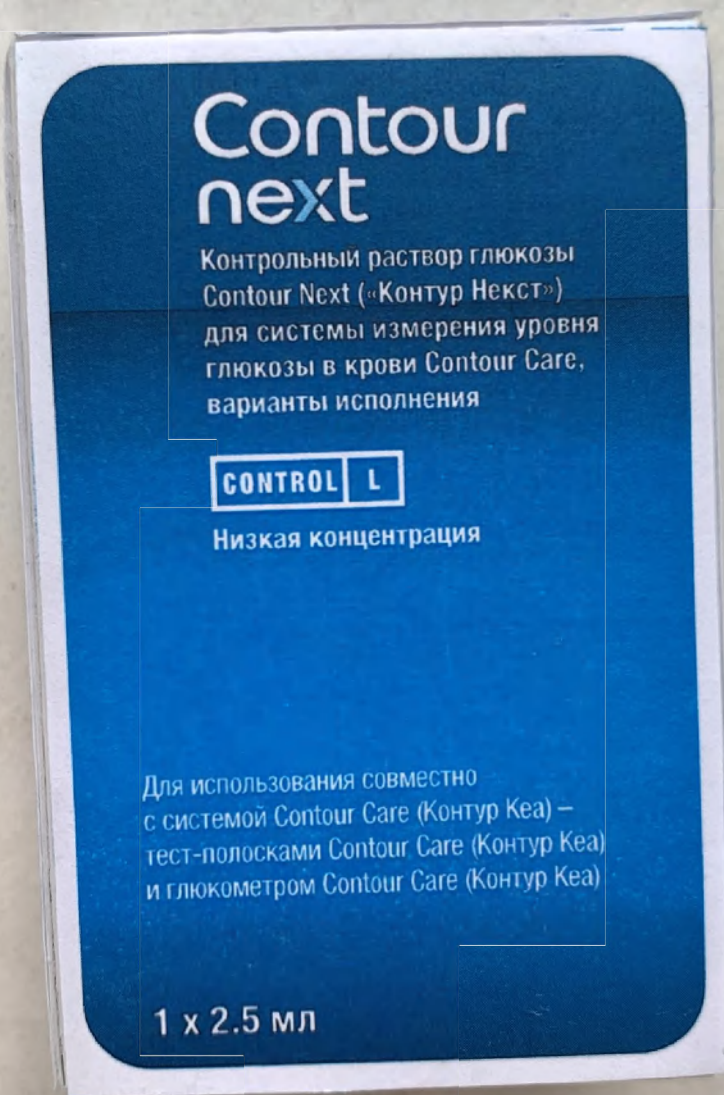



LOT 1BV1C27

 **2023-01**





Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Peter Merian-Strasse 90
4052 Basel, Switzerland
Асцензия Диабитис Кеа Холдингс АГ, Швейцария

© 2021 Ascensia Diabetes Care Holdings AG.
Все права защищены.

Уполномоченный представитель в РФ:
ООО «Асцензия Диабетическая продукция»
123610, г. Москва,
Краснопресненская наб., дом 12, офис 706
тел. 8 800 200 44 43
Контрольный раствор произведен в США.



ASCENSIA
Diabetes Care



Флакон





2) Инструкция по применению – 1 шт.

Contour next КОНТУР НЕКСТ

Контрольные растворы глюкозы Contour Next («Контур Некст») для системы измерения уровня глюкозы в крови Contour Care, варианты использования

Для использования
с тест-полосками
Contour Care («Контур Кеа»)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Перед каждым использованием встряхните флакон с контрольным раствором не менее 15 раз.
- Использование не перемешанного контрольного раствора может привести к неточным результатам.
 - Не калибруйте систему измерения уровня глюкозы в крови по результатам контрольного тестирования.
 - Не рассчитывайте болюс на основании результатов контрольного тестирования.

Назначение: Контрольные растворы Contour Next («Контур Некст») – это водные растворы глюкозы, предназначенные для проверки качества полученных результатов при самостоятельном измерении уровня глюкозы в крови людьми с диабетом и медицинскими работниками. Контрольные растворы используются совместно с системой Contour Care («Контур Кеа») (тест-полосками Contour Care («Контур Кеа») и глюкометром Contour Care («Контур Кеа»). Контрольные растворы могут использоваться взрослыми и детьми от 2-х лет (взрослые могут проводить тестирование у детей с 2-х лет). Контрольные растворы являются вспомогательным средством в *in vitro* диагностике.

Краткая информация: Эти контрольные растворы содержат определенное количество глюкозы.

Необходимо проведение контрольного теста:

- при первом использовании глюкометра;
- при открытии нового флакона или упаковки тест-полосок;
- при подозрении на неправильную работу глюкометра;
- при неоднократном получении неожиданных результатов измерения уровня глюкозы в крови.

Всегда советуйтесь с врачом, прежде чем переходить на другие лекарства по результатам анализа с помощью глюкометра CONTOUR CARE (КОНТУР КЕА).

Условия хранения и обращения:

- Храните контрольные растворы при температуре от 9°C до 30°C.
- Если глюкометр и/или тест-полоски подвергнуты резкому перепаду температуры, подождите 20 минут, чтобы они адаптировались к новой температуре, прежде чем проводить контрольный тест.
- Рабочий диапазон температуры контрольного тестирования на глюкометрах Contour Care («Контур Кеа») составляет от 15°C до 35°C.**
- Запрещено использовать контрольный раствор после истечения срока годности, указанного на этикетке флакона и на коробке, а также по истечении шести месяцев со дня вскрытия флакона. Мы рекомендуем вам для напоминания написать дату утилизации, которая наступит через шесть месяцев с момента первого открывания флакона, в отведенном для этого месте на наклейке флакона.
- Проверьте глюкометр на предмет нехватки, повреждения и поломки частей. За запасными частями обращайтесь в Службу по работе с клиентами по тел.: 8 800 200 44 43.



Процедура анализа: Прежде чем проводить проверку с контрольным раствором, прочтите руководство пользователя глюкометром Contour Care («Контур Кеа»), содержащее полный текст инструкции.

ВАЖНО:



- Перед каждым использованием встряхните флакон с контрольным раствором не менее 15 раз.
- Использование не перемешанного контрольного раствора может привести к неточным результатам.

- Перед проведением теста обязательно убедитесь в том, что срок годности продукции не истек, и дата ее утилизации не наступила.
- Используйте с тест-полосками Contour Care («Контур Кеа») только контрольный раствор глюкозы Contour Next («Контур Некст»). При использовании другого контрольного раствора результат может оказаться неточным.
- Перед каждым использованием встряхните флакон с контрольным раствором не менее 15 раз.
- Снимите колпачок флакона и перед получением капли при помощи ткани удалите всю жидкость вокруг горлышка флакона.
- Выдавите маленькую каплю раствора на чистую неаллигированную поверхность. Не наносите контрольный раствор на кончик пальца или тест-полоску непосредственно из флакона.
- Немедленно прикоснитесь кончиком тест-полоски к капле контрольного раствора.
- Держите заборный кончик тест-полоски в капле раствора, пока глюкометр не издает звуковой сигнал.
- Утилизируйте использованные тест-полоски как медицинские отходы или в соответствии с рекомендациями вашего медицинского работника.

Результаты анализа: Сравните результаты контрольного теста с контрольными диапазонами, указанными на этикетке флакона с тест-полосками Contour Care («Контур Кеа»).

Сомнительные или нестабильные результаты: Если полученный результат находится за пределами диапазона, указанного на флаконе или коробке с тест-полосками, это может означать, что...

Химический состав:	Нормальная концентрация	0,07	99,93
	Низкая концентрация	0,03	99,97
	Высокая концентрация	0,18	99,82



Диапазон Контроля Нормальной Концентрации
Диапазон Контроля Низкой Концентрации
Диапазон Контроля Высокой Концентрации



Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Peter Morian-Strasse 90
4052 Basel, Switzerland
Асцензия Дабитис Кеа Холдингс АГ, Швейцария

Уполномоченный представитель в РФ:
ООО «Асцензия Дабитическая продукция»
123610, г. Москва, Краснопресненская наб.,
дом 12, офис 706
тел.: 8 800 200 44 43
www.diabetes.ascensia.com

ASCENSIA
Diabetes Care

Информация о патентах и связанных лицензиях см. по адресу: www.patents.ascensia.com



Встряхните
15 раз

CE
2797
Rev. 06/22

Ascensia, логотип Ascensia Diabetes Care и CONTOUR (Контур) являются товарными знаками и (или) зарегистрированными товарными знаками компании Ascensia Diabetes Care Holdings AG (Асцензия Дабитис Кеа Холдингс АГ).
© 2022 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Все права защищены.
90008709

4. Контрольный раствор глюкозы Contour Next («Контур Некст») для системы измерения уровня глюкозы в крови Contour Care, высокая концентрация, в составе:

1) Контрольный раствор глюкозы высокой концентрации Contour Next («Контур Некст») High 2,5 мл – 1 шт.
Картонная коробка






LOT 1BV3B28

⌚ 2022-09

Contour next

CONTROL H

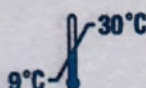

Для самостоятельного проведения теста.


Контрольный раствор глюкозы Contour Next («Контур Некст») для системы измерения уровня глюкозы в крови Contour Care, высокая концентрация, в составе:

- 1) Контрольный раствор глюкозы высокой концентрации Contour Next («Контур Некст») High 2,5 мл – 1 шт.
- 2) Инструкция по применению – 1 шт.

www.diabetes.ascensia.com.ru

www.patents.ascensia.com

90008705 Rev. 06/21

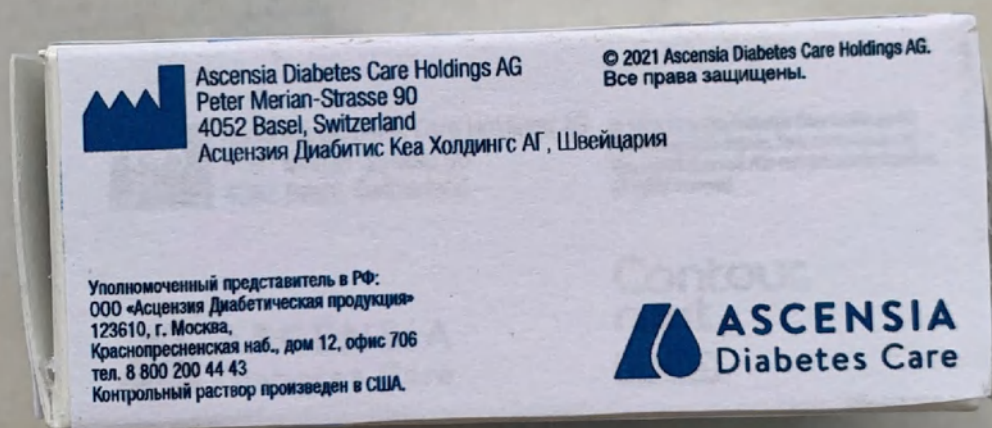



Флакон







2) Инструкция по применению – 1 шт.

Contour next Контур НЕКСТ

Контрольный раствор глюкозы Contour Next («Контур Некст») для системы измерения уровня глюкозы в крови Contour Care, варианты исполнения

Для использования
с тест-полосками
Contour Care («Контур Кеа»)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Перед каждым использованием встряхните флакон с контрольным раствором не менее 15 раз.
- Использование не перемешанного контрольного раствора может привести к неточным результатам.
 - Не калибруйте систему измерения уровня глюкозы в крови по результатам контрольного тестирования.
 - Не рассчитывайте баланс на основании результатов контрольного тестирования.

Назначение: Контрольные растворы Contour Next («Контур Некст») – это водные растворы глюкозы, предназначенные для проверки качества полученных результатов при самостоятельном измерении уровня глюкозы в крови людьми с диабетом и медицинскими работниками. Контрольные растворы используются совместно с системой Contour Care («Контур Кеа») (тест-полосками Contour Care («Контур Кеа») и глюкометром Contour Care («Контур Кеа»). Контрольные растворы могут использоваться взрослыми и детьми от 2-х лет (взрослые могут проводить тестирование у детей с 2-х лет). Контрольные растворы являются вспомогательным средством в *in vitro* диагностике.

Краткая информация: Эти контрольные растворы содержат определенное количество глюкозы.

Необходимо проведение контрольного теста:

- при первом использовании глюкометра;
- при открытии нового флакона или упаковки тест-полосок;
- при подозрении на неправильную работу глюкометра;
- при неоднократном получении неожиданных результатов измерения уровня глюкозы в крови.

Всегда советуйтесь с врачом, прежде чем переходить на другие лекарства по результатам анализа с помощью глюкометра Contour Care («Контур Кеа»).

Условия хранения и обращения:

- Храните контрольные растворы при температуре от 9°C до 30°C.
- Если глюкометр и/или тест-полоски подвергались резкому перепаду температуры, подождите 20 минут, чтобы они адаптировались к новой температуре, прежде чем проводить контрольный тест. Рабочий диапазон температуры контрольного тестирования на глюкометрах Contour Care («Контур Кеа») составляет от 15°C до 35°C.
- Запрещено использовать контрольный раствор после истечения срока годности, указанного на этикетке флакона и на коробке, а также по истечении шести месяцев со дня вскрытия флакона. Мы рекомендуем вам для напоминания написать дату утилизации, которая наступит через шесть месяцев с момента первого открывания флакона, в отведенном для этого месте на наклейке флакона.
- Проверьте глюкометр на предмет нехватки, повреждения и поломки частей. За запасными частями обращайтесь в Службу по работе с клиентами по тел.: 8 800 200 44 43.

Процедура анализа: Прежде чем проводить проверку с контрольным раствором, прочтите руководство пользователя глюкометром Contour Care («Контур Кеа»), содержащее полный текст инструкции.

ВАЖНО:

- Перед каждым использованием встряхните флакон с контрольным раствором не менее 15 раз.
- Использование не перемешанного контрольного раствора может привести к неточным результатам.

- Перед проведением теста обязательно убедитесь в том, что срок годности продукции не истек, и дата ее утилизации не наступила.
- Используйте с тест-полосками Contour Care («Контур Кеа») только контрольный раствор глюкозы Contour Next («Контур Некст»). При использовании другого контрольного раствора результат может оказаться неточным.
- Перед каждым использованием встряхните флакон с контрольным раствором не менее 15 раз.
- Снимите колпачок флакона и перед получением капли при помощи ткани удалите всю жидкость вокруг горлышка флакона.
- Выдавите маленькую каплю раствора на чистую невапитывающую поверхность. Не наносите контрольный раствор на кончик пальца или тест-полоску непосредственно из флакона.
- Немедленно прикоснитесь кончиком тест-полоски к капле контрольного раствора.
- Держите заборный кончик тест-полоски в капле раствора, пока глюкометр не издаст звуковой сигнал.
- Утилизируйте использованные тест-полоски как медицинские отходы или в соответствии с рекомендациями вашего медицинского работника.

Результаты анализа: Сравните результаты контрольного теста с контрольными диапазонами, указанными на этикетке флакона с тест-полосками Contour Care («Контур Кеа»).

Сомнительные или нестабильные результаты: Если полученный результат находится за пределами диапазона, указанного на флаконе или коробке с тест-полосками, это может указывать на проблему с тест-полосками, с глюкометром или с методом проверки. Если результат контрольного теста находится за пределами диапазона, не пользуйтесь глюкометром Contour Care («Контур Кеа») пока не устраните проблему.

Внимательно прочтите раздел Проверка с контрольным раствором руководства пользователя глюкометра Contour Care («Контур Кеа»).

Важно! Если вам не удается справиться с проблемой, обратитесь в Службу по работе с клиентами по тел.: 8 800 200 44 43.



- Информация о безопасности**
- Контрольные растворы Contour Next («Контур Некст») предназначены только для диагностики *in vitro*.
 - Не глотать и не использовать для инъекций.

Химический состав:		Глюкоза (% вес/объем)		Неактивные Ингредиенты (% вес/объем)	
		0,07	0,03	99,93	99,97
	Нормальная концентрация				
	Низкая концентрация	0,18		99,82	
	Высокая концентрация				

Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Peter Meroni-Strasse 90
4052 Basel, Switzerland
Асценсия Дабитис Кеа Холдингс АГ, Швейцария

Диапазон Контроля Нормальной Концентрации
Диапазон Контроля Низкой Концентрации
Диапазон Контроля Высокой Концентрации

Уполномоченный представитель в РФ:

ASCENSIA
Diabetes Care

CE

ПРОШТО И
ПРОНУМЕРАНО
38 ЛИСТОВ



Менеджер по
регистрации

Подпись

Доброва Е.П.