

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор

ООО «Медтехника-Р»

В.В. Катая

« 15 » 09 2021 г



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ:


Насос шприцевой в вариантах исполнения с принадлежностями
по ТУ32.50.50-001-98238288-2020,
зарегистрированный товарный знак MED-MOS

Москва

2021 г.




Внешний вид МИ: Насос шприцевой FA513

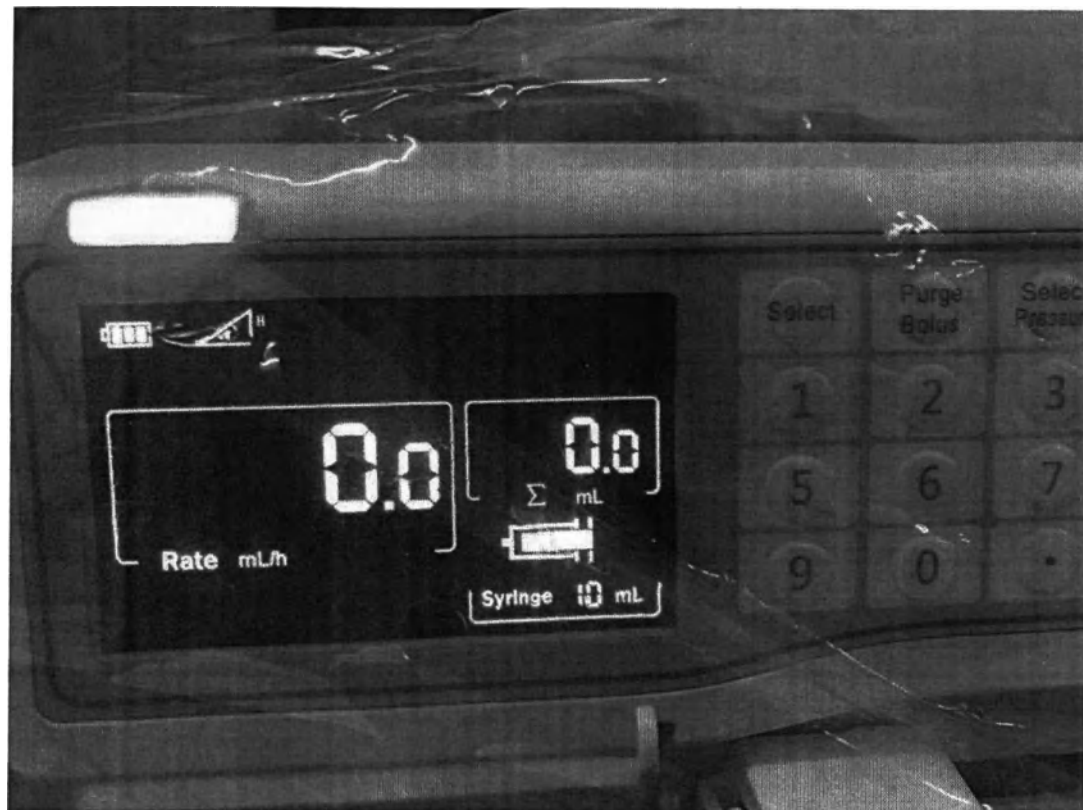


Начальный экран дисплея «Насос шприцевой FA513»




Сетевой кабель

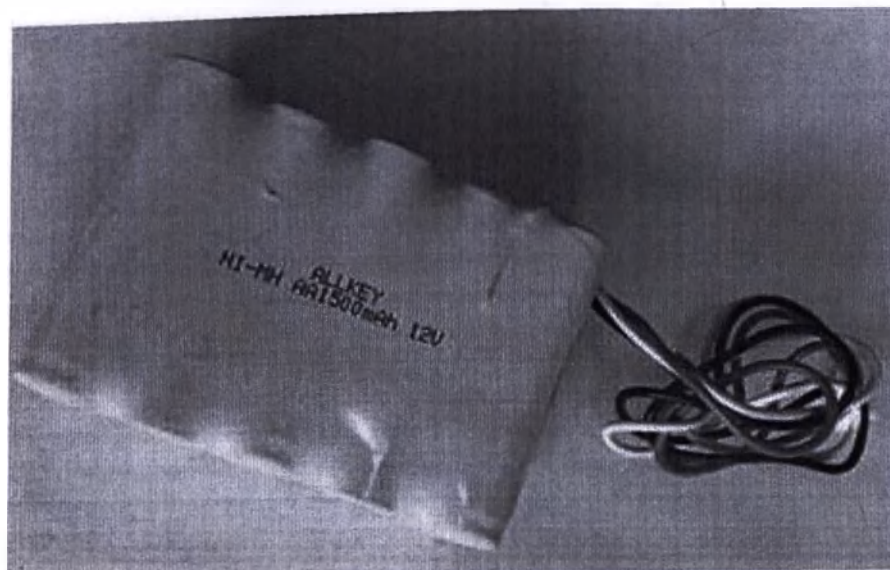


Внешний вид внутренней батареи для насоса шприцевого FA513

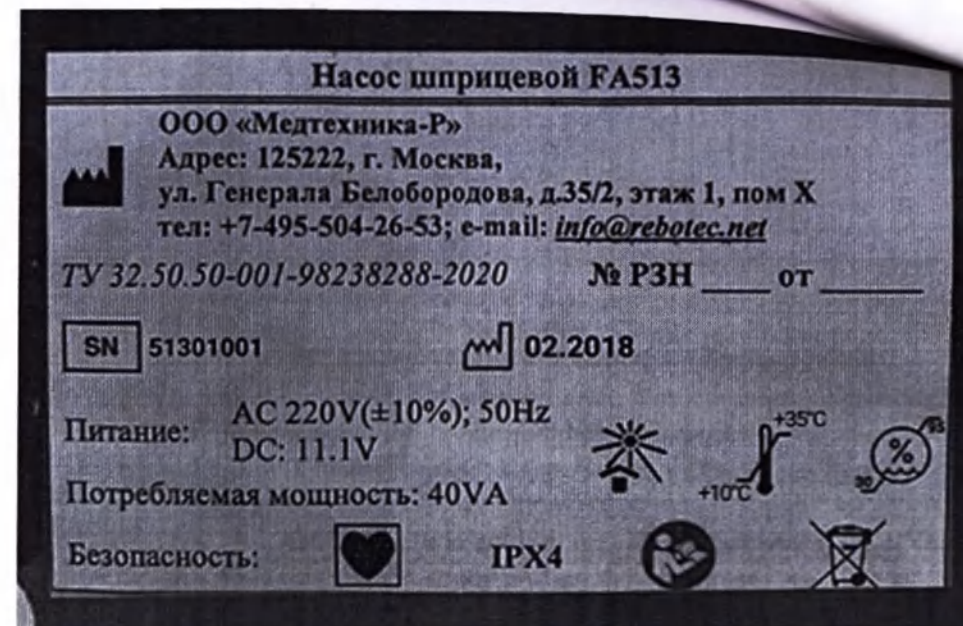


Образец маркировки Насос шприцевой FA513

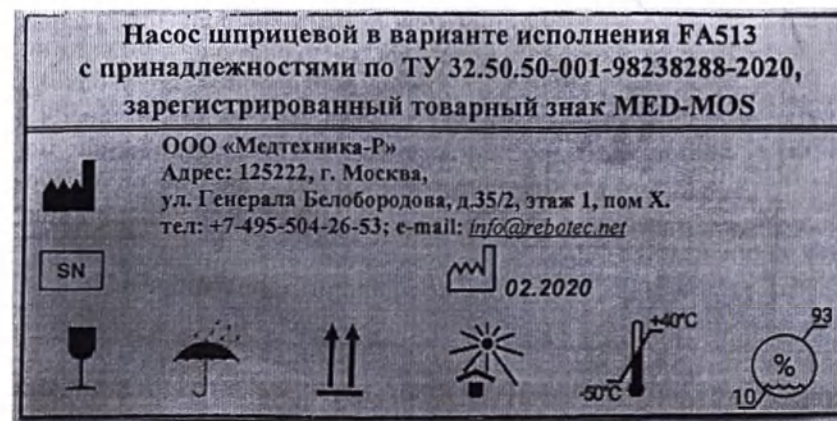


Образец транспортной маркировки для насоса FA513

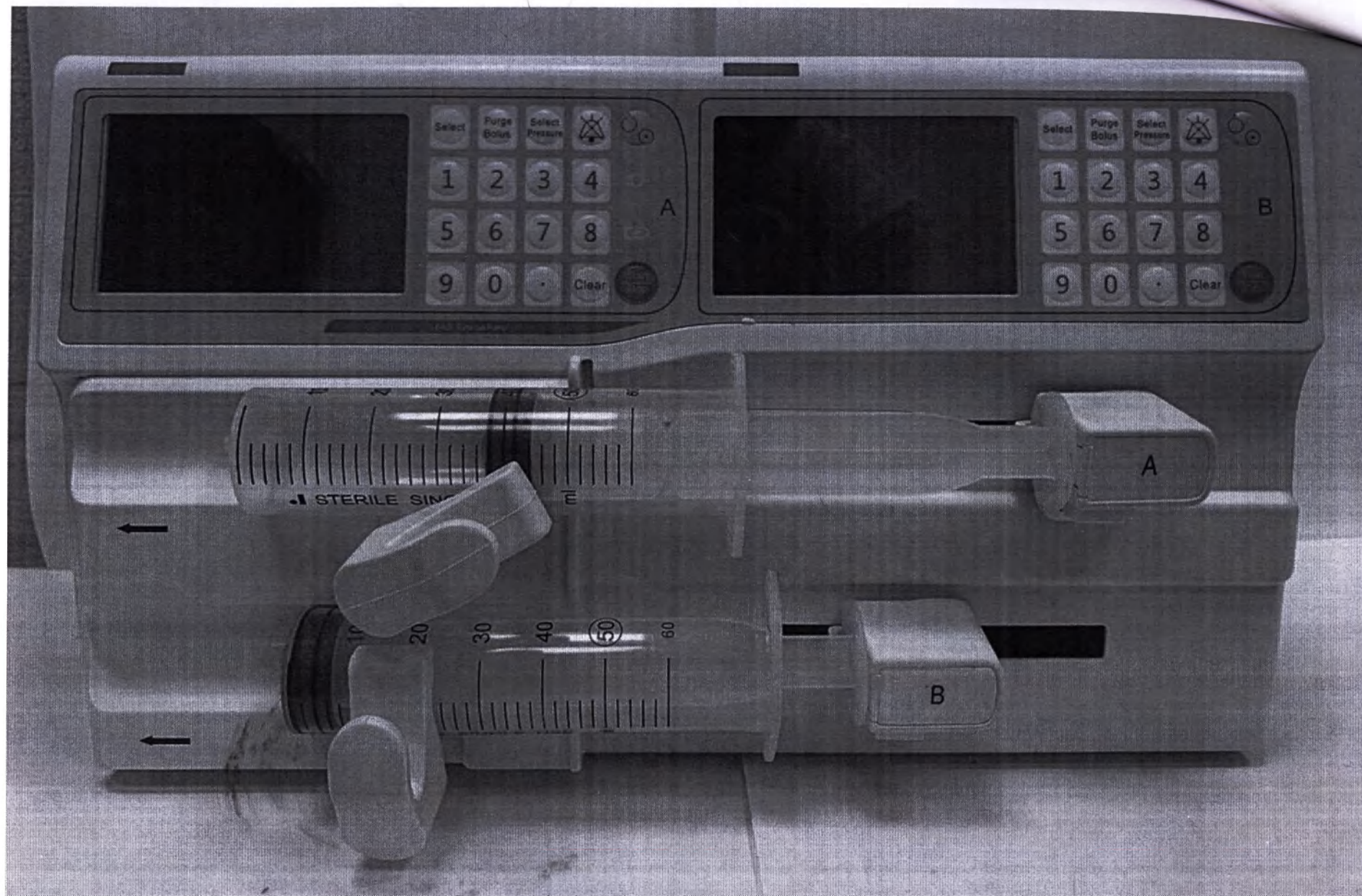

Наос шприцевой FA 523 Вид спереди

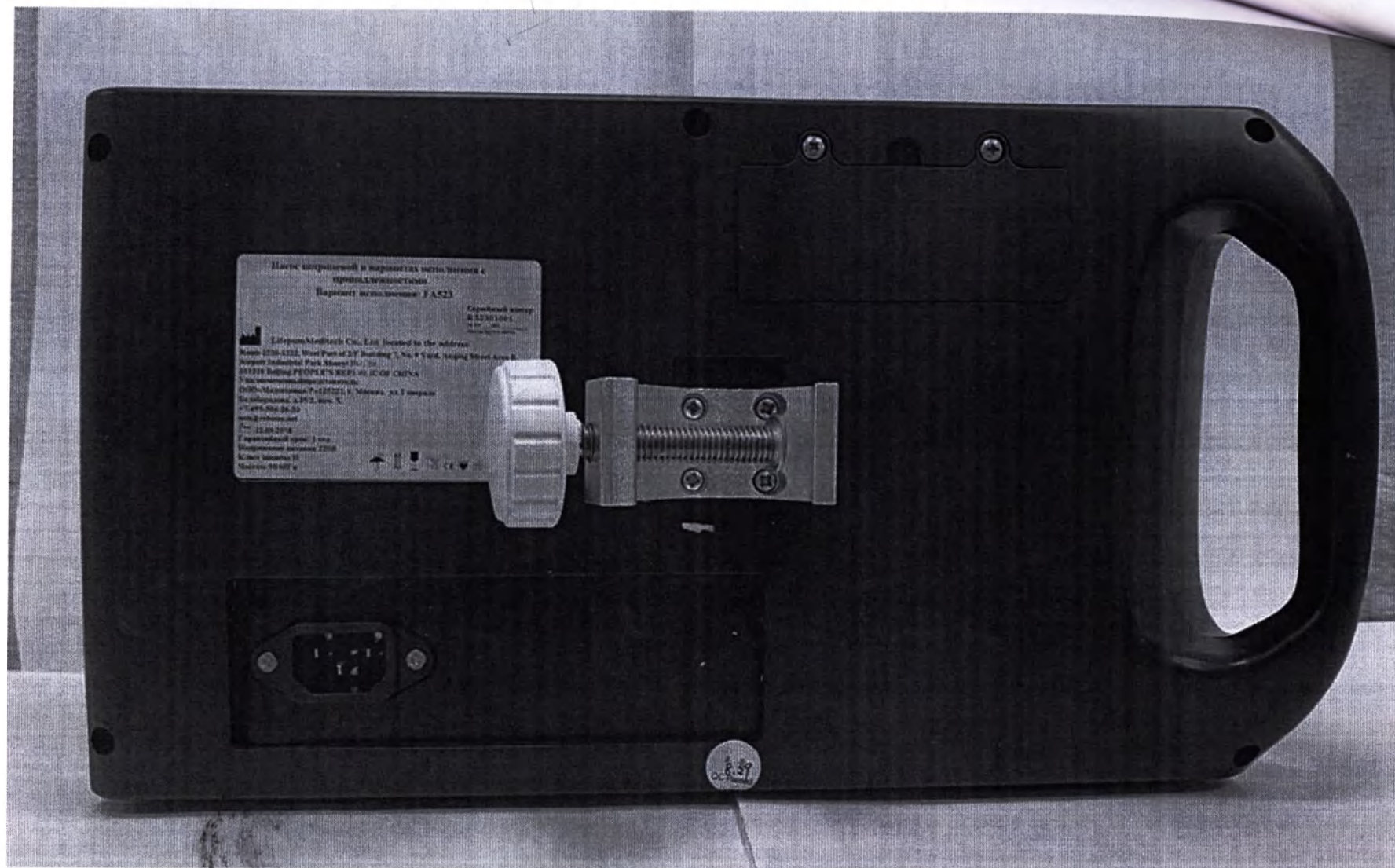

Наос шприцевой FA 523 Вид сзади

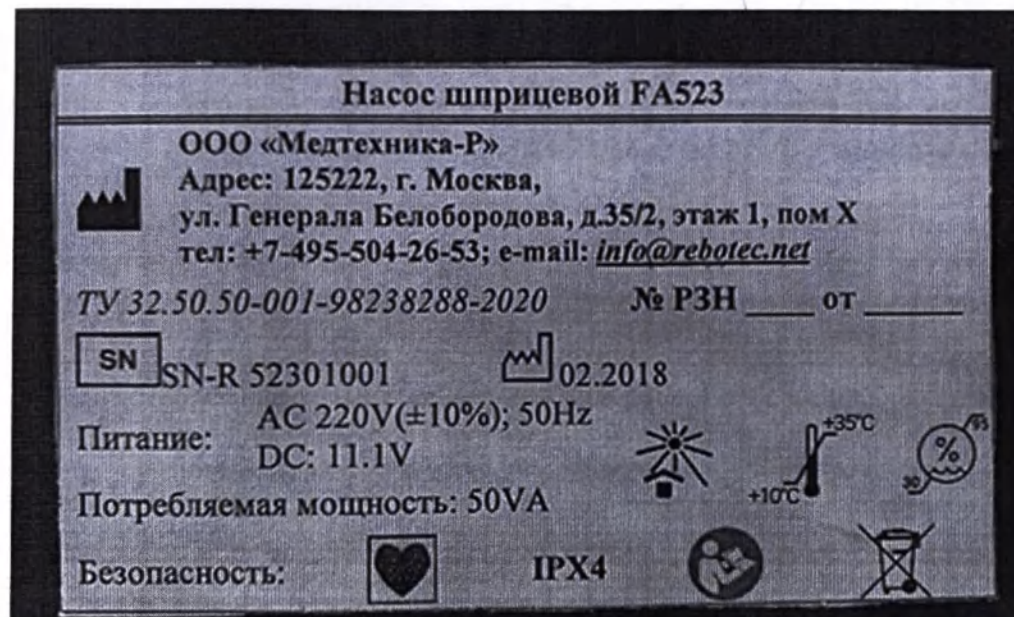

Образец маркировки Насос шприцевой FA523




Внешний вид сетевой кабель



Внешний вид внутренней батареи для насоса шприцевого FA523




Наос шприцевой FC113 Вид спереди

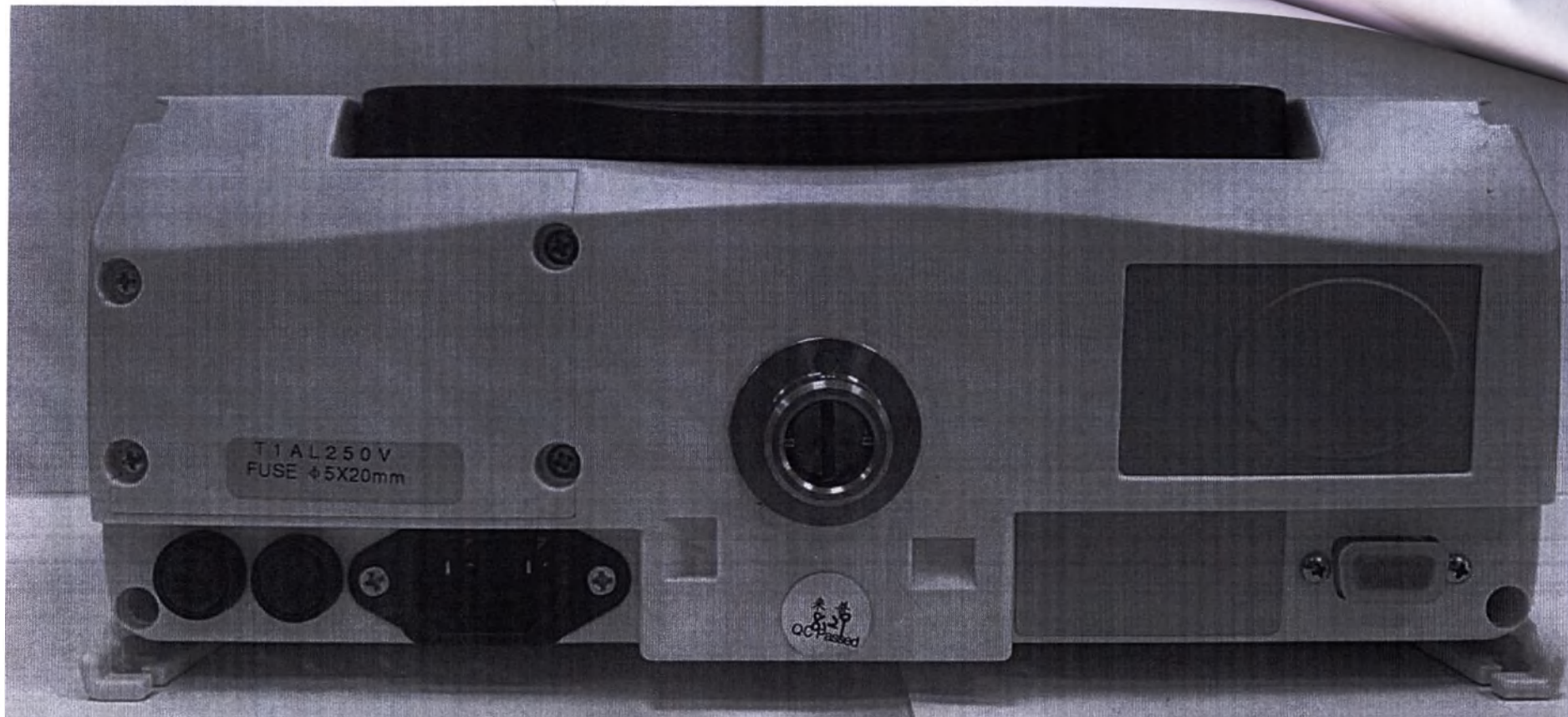

Наос шприцевой FC113 Вид сзади




Внешний вид кабель питания

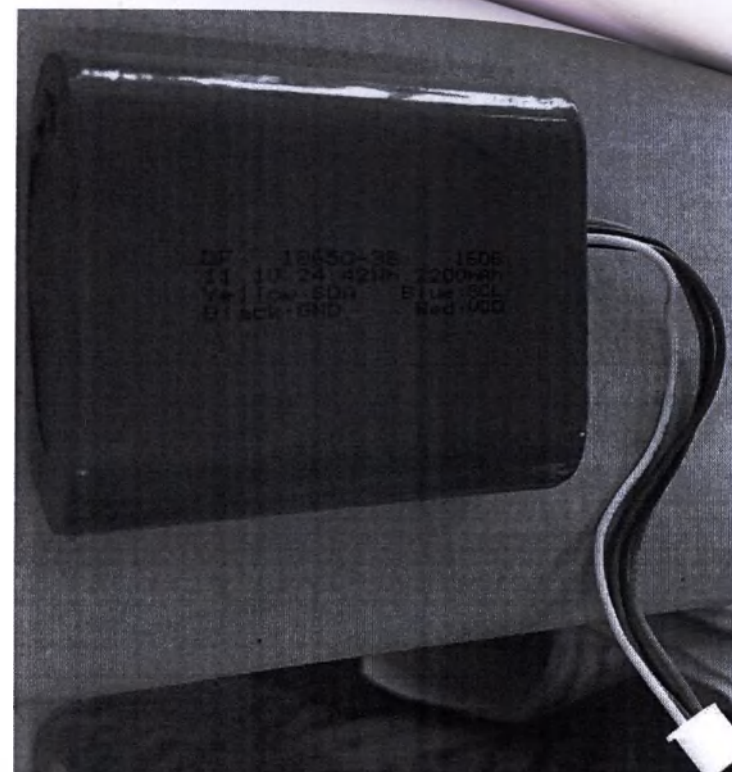


Внешний вид внутренней батареи для насоса шприцевого FC113




Образец маркировки Насос шприцевой FC113

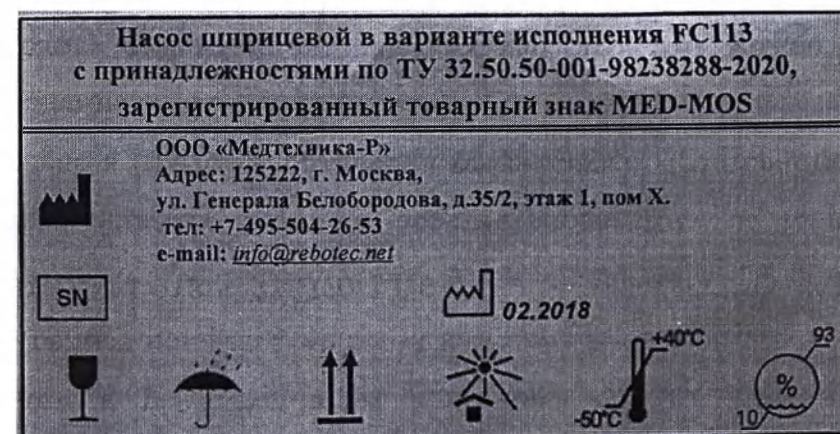


Образец транспортной маркировки для насоса FC113

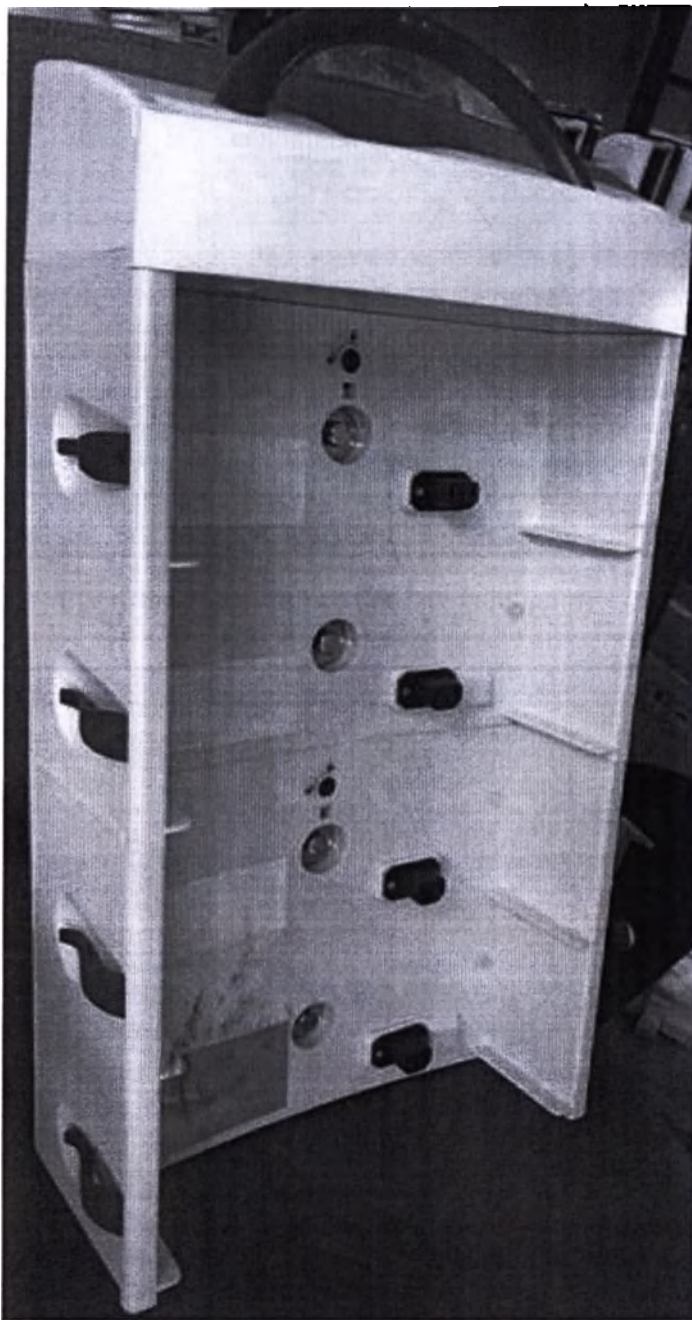

Внешний вид станции Telefusion (вид спереди)

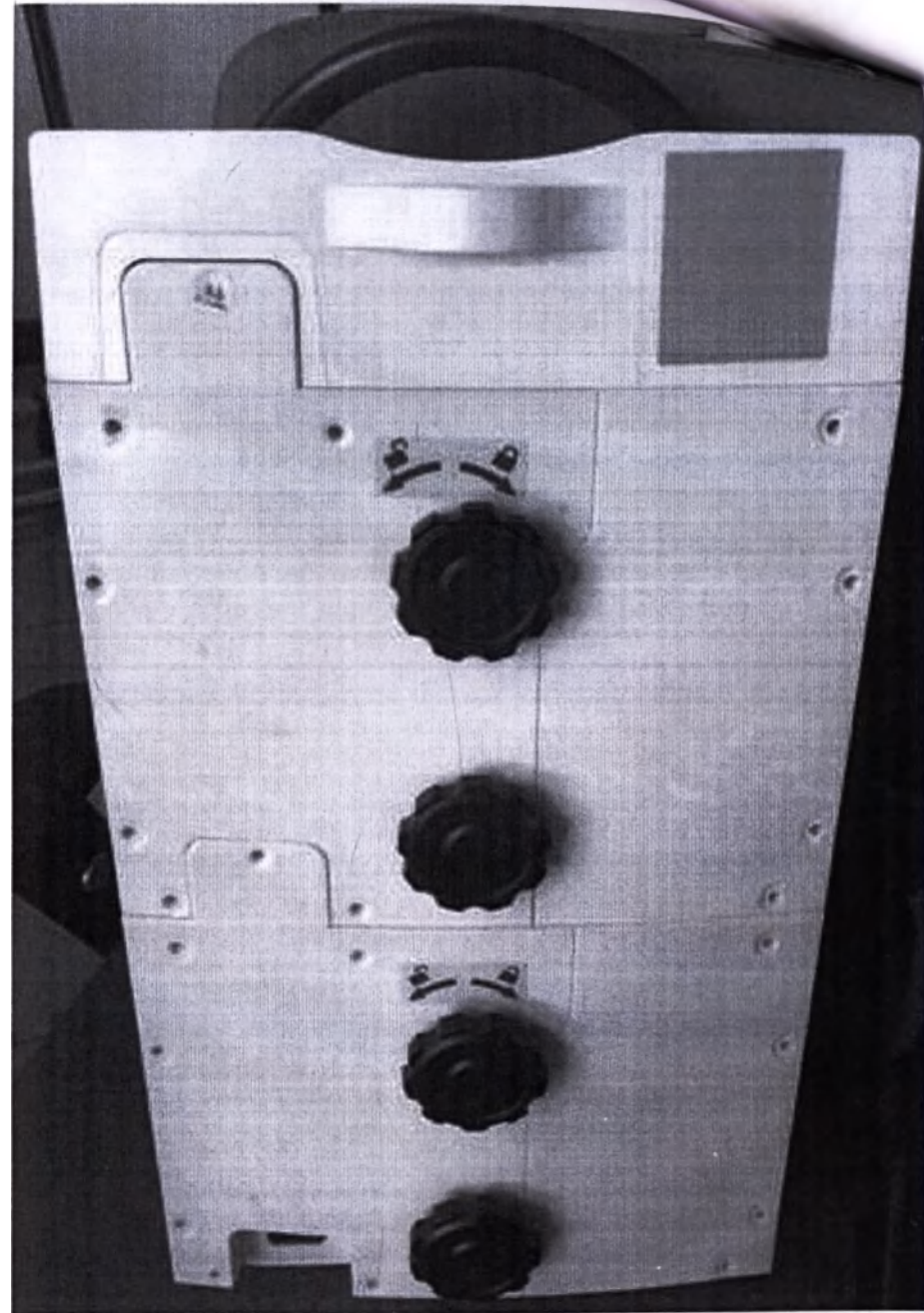


Внешний вид станции Telefusion (вид сзади)

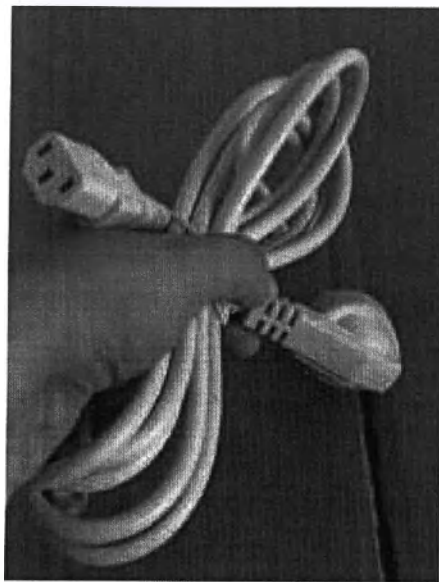

Кабель питания станции Telefusion




Образец маркировки Станция Telefusion

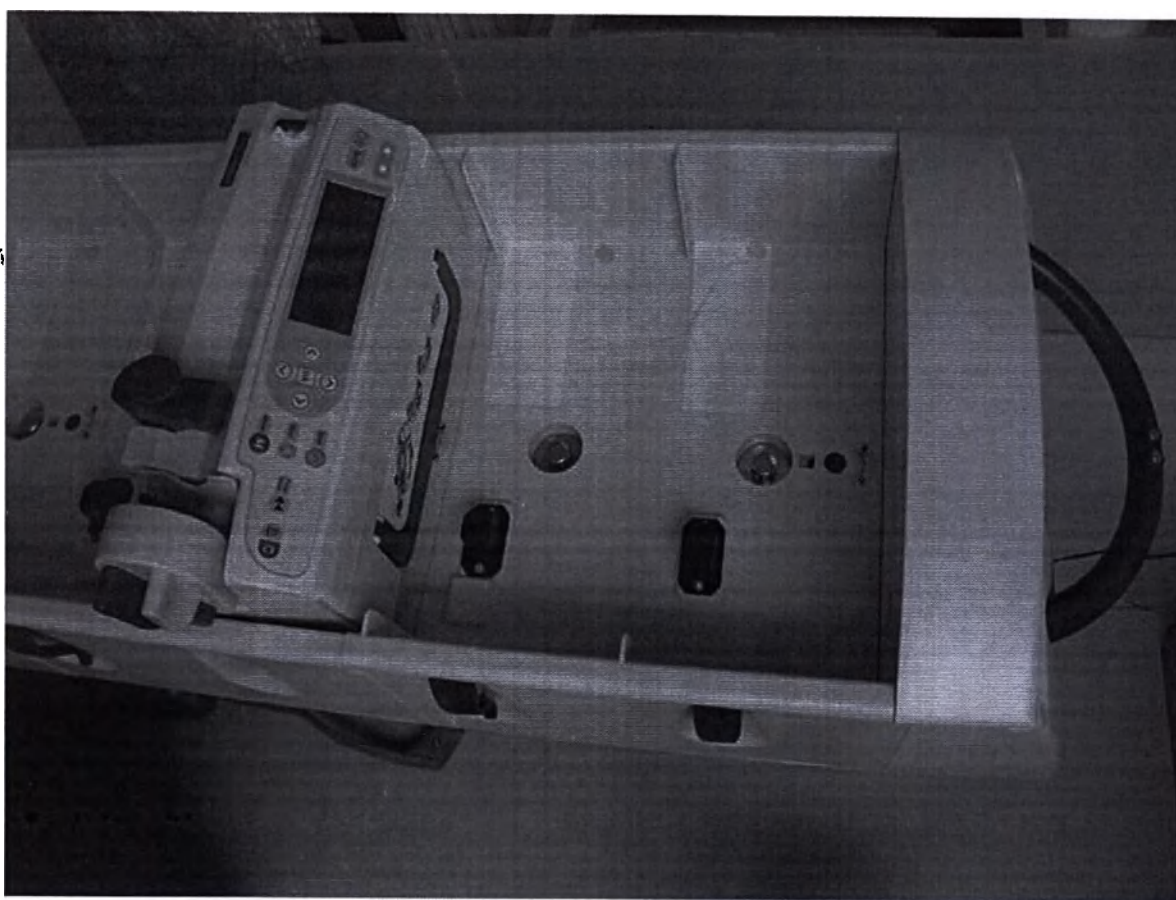





Насос шприцевой SPA111 (Вид спереди)

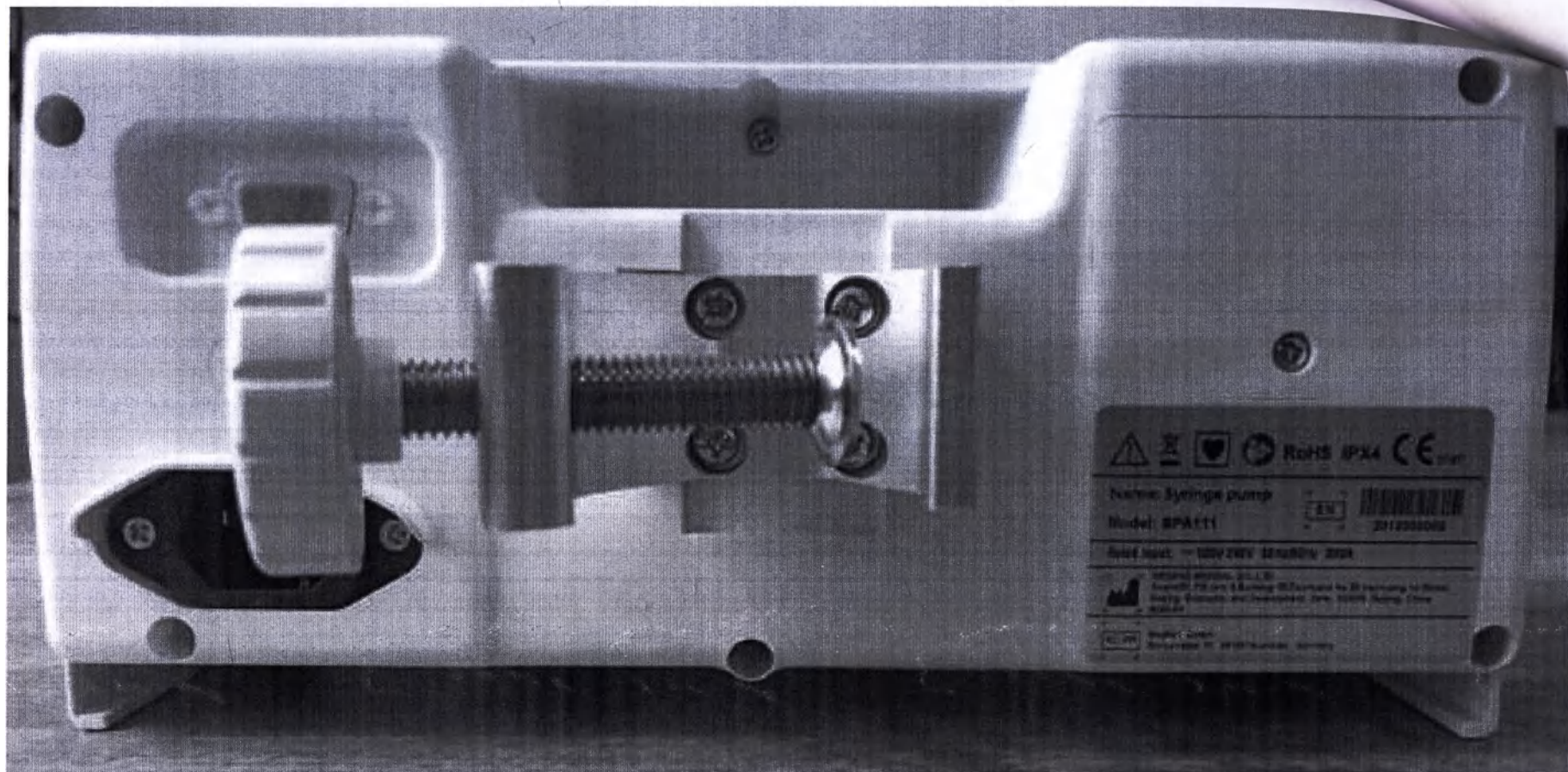

Насос шприцевой SPA111 (Вид сзади)

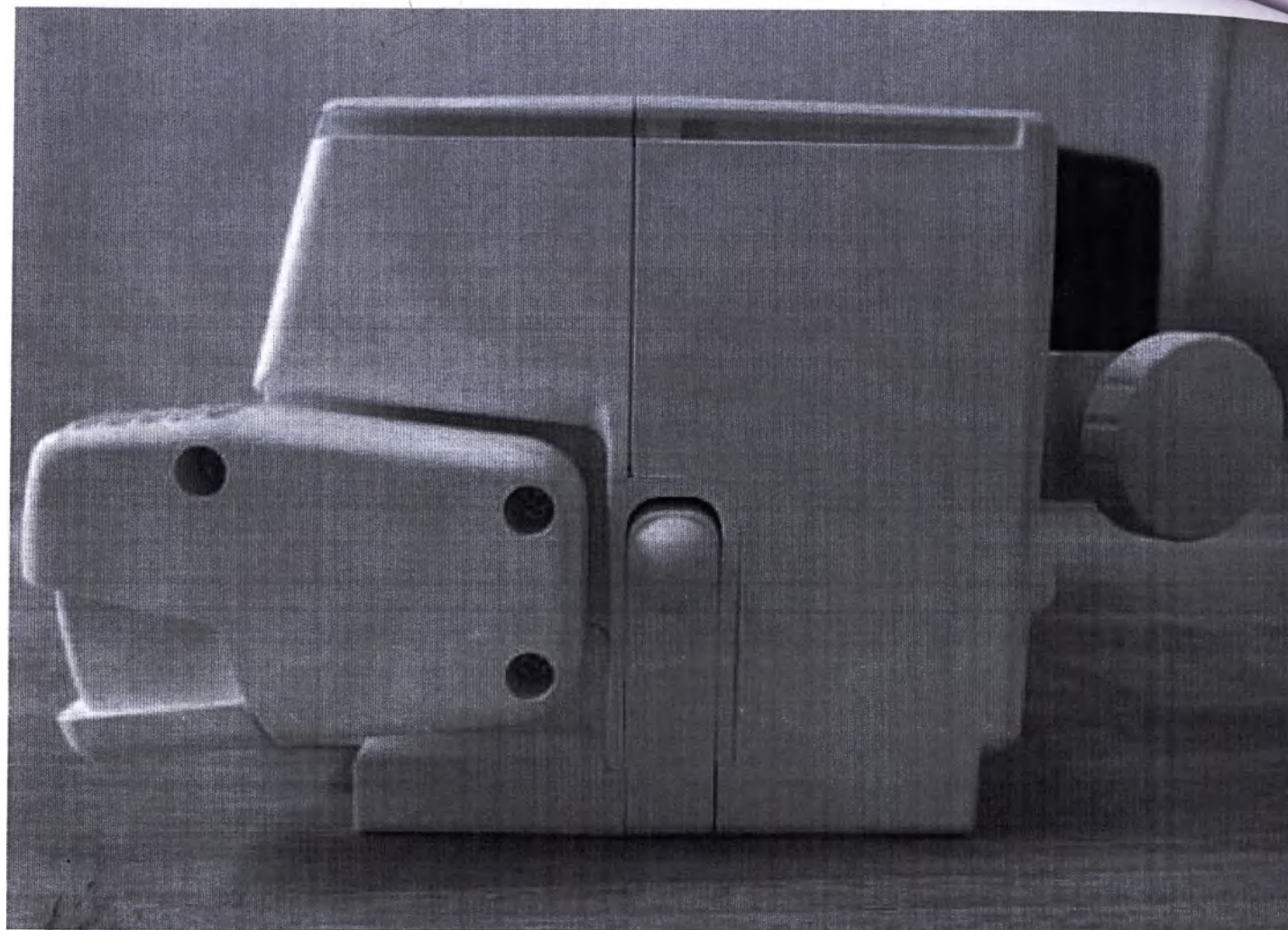

Насос шприцевой SPA111 (Вид справа)

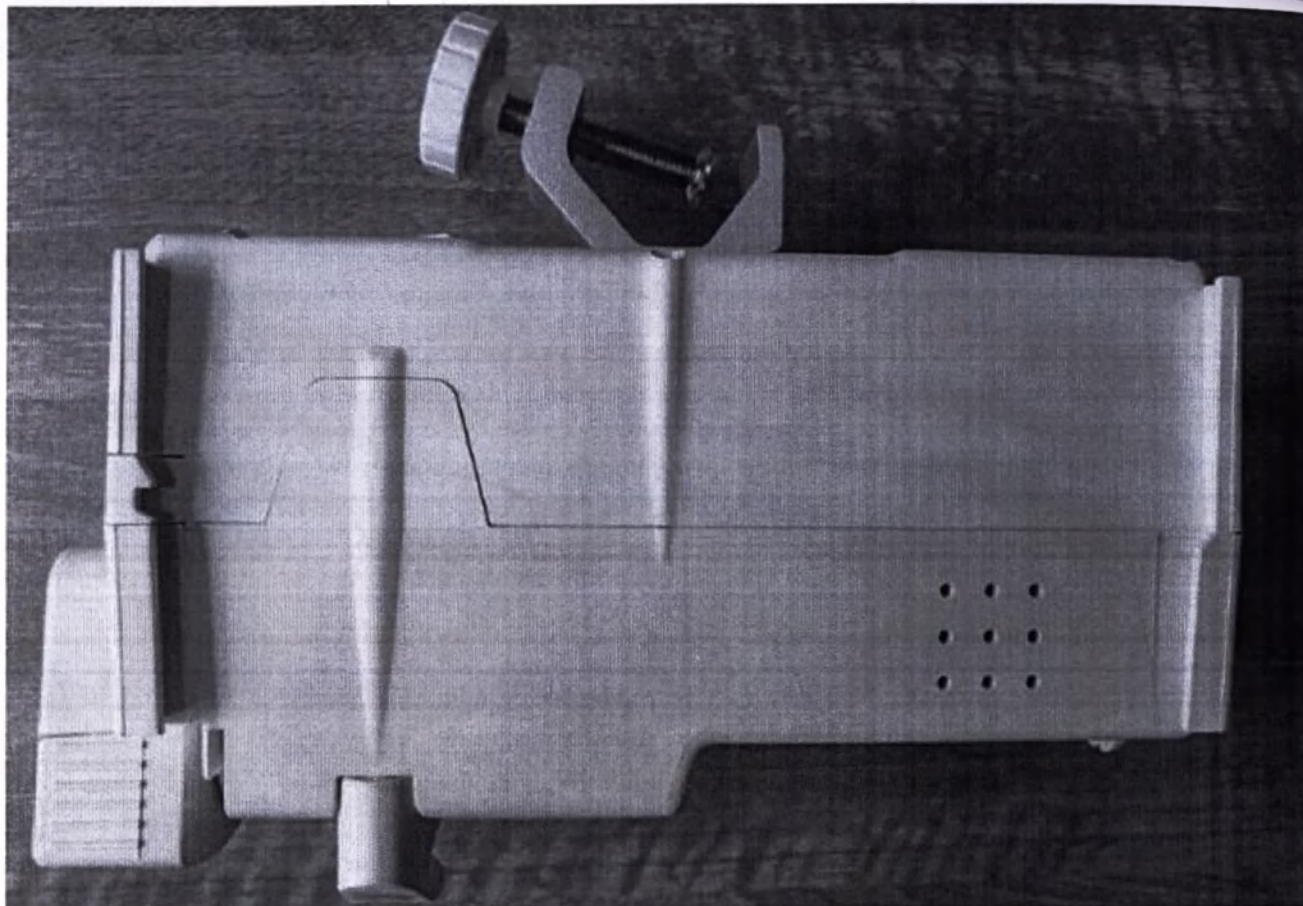


Насос шприцевой SPA111 (Вид снизу)

Body Weight Mode Operation Instructions

1. Press " " to select body weight mode.
2. Press " " to enter setting mode.
3. Set the parameters according to the Body-weight UNIT List.
4. Press " " select "DOSE RATE", input drug dosage value.
5. Press " " select "BODY WT", input patient weight value (KG).
6. Press " " select "DRUG MASS", input drug amount value.
7. Press " " select "SOL VOL", input the solution volume value.
8. Equipment automatically calculate the infusion rate, if flow rate no problem, press " " to log out the body weight mode.
9. Press " " select Volume to be infused (VTBI), enter the VTBI value.
10. If body weight mode parameters is not completely set, press " " to log out body weight mode, all parameters recover to Zero, or change the body weight mode List number to 0, all parameters recover to Zero, press " " to Log out body weight mode.

No.	UNIT	No.	UNIT
1	ug/kg/min	11	ug/min
2	mg/kg/min	12	mg/min
3	g/kg/min	13	g/min
4	ml/kg/min	14	ml/min
5	l/kg/min	15	l/min
6	ug/h	16	ug/h
7	mg/h	17	mg/h
8	g/h	18	g/h
9	ml/h	19	ml/h
10	l/h	20	l/h


Syringe Installation Indication

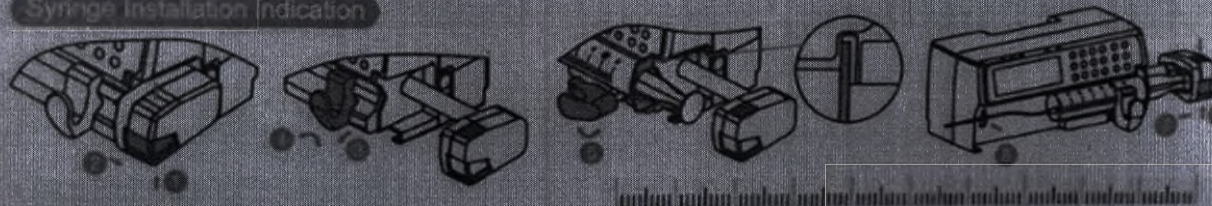

Насос шприцевой SPA111 (Вид сверху)




Сетевой кабель

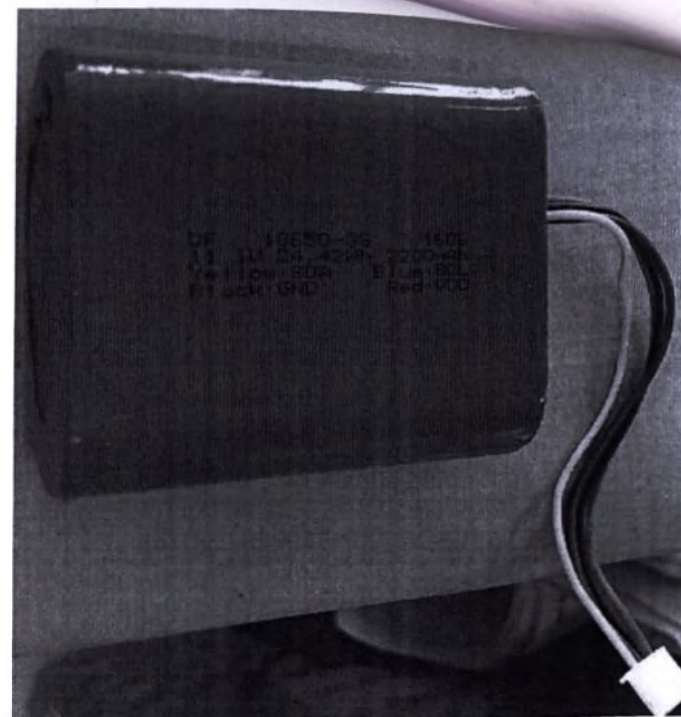


Внешний вид внутренней батареи для насоса шприцевого SPA111




Образец маркировка Насос шприцевой SPA111

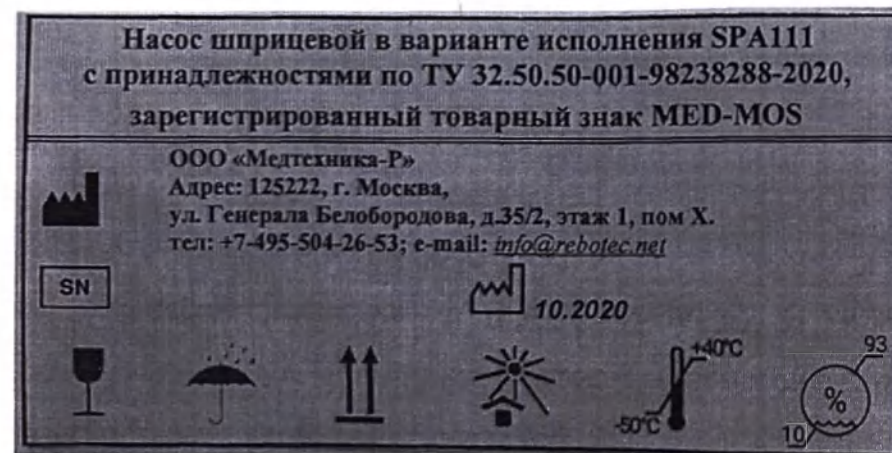


Образец транспортной маркировки Насос шприцевой SPA111

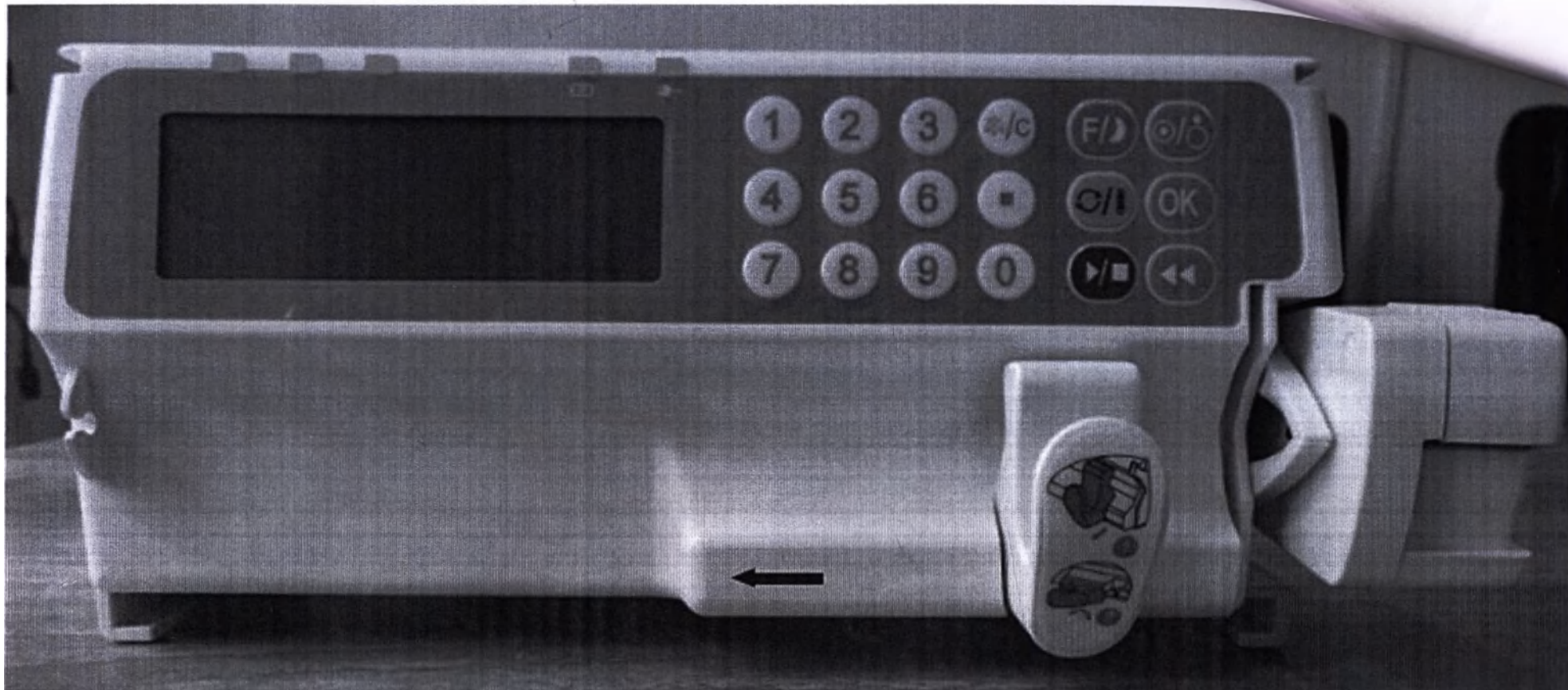


Насос шприцевой SPA112 (Вид спереди)

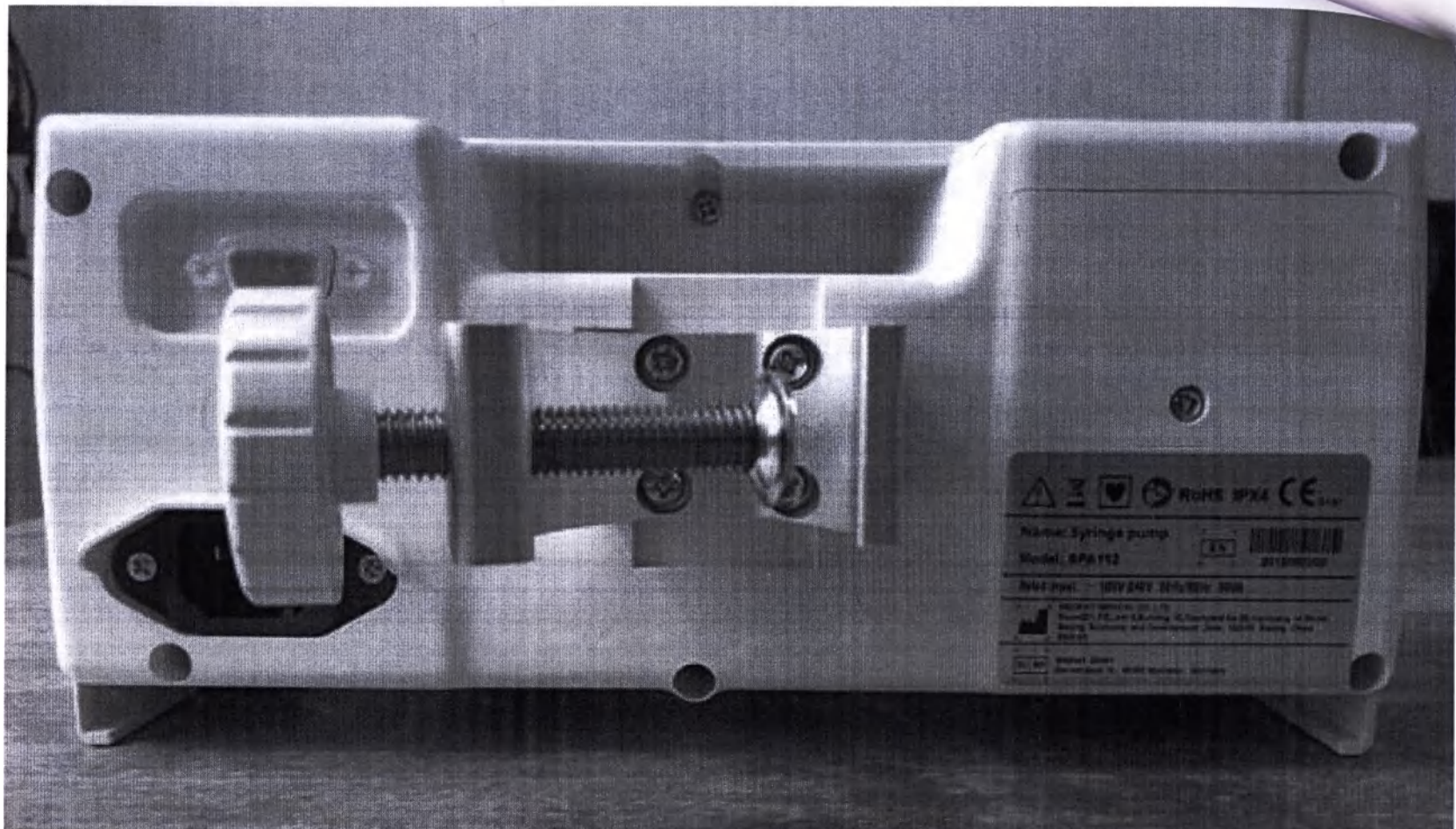


Насос шприцевой SPA112 (Вид сзади)

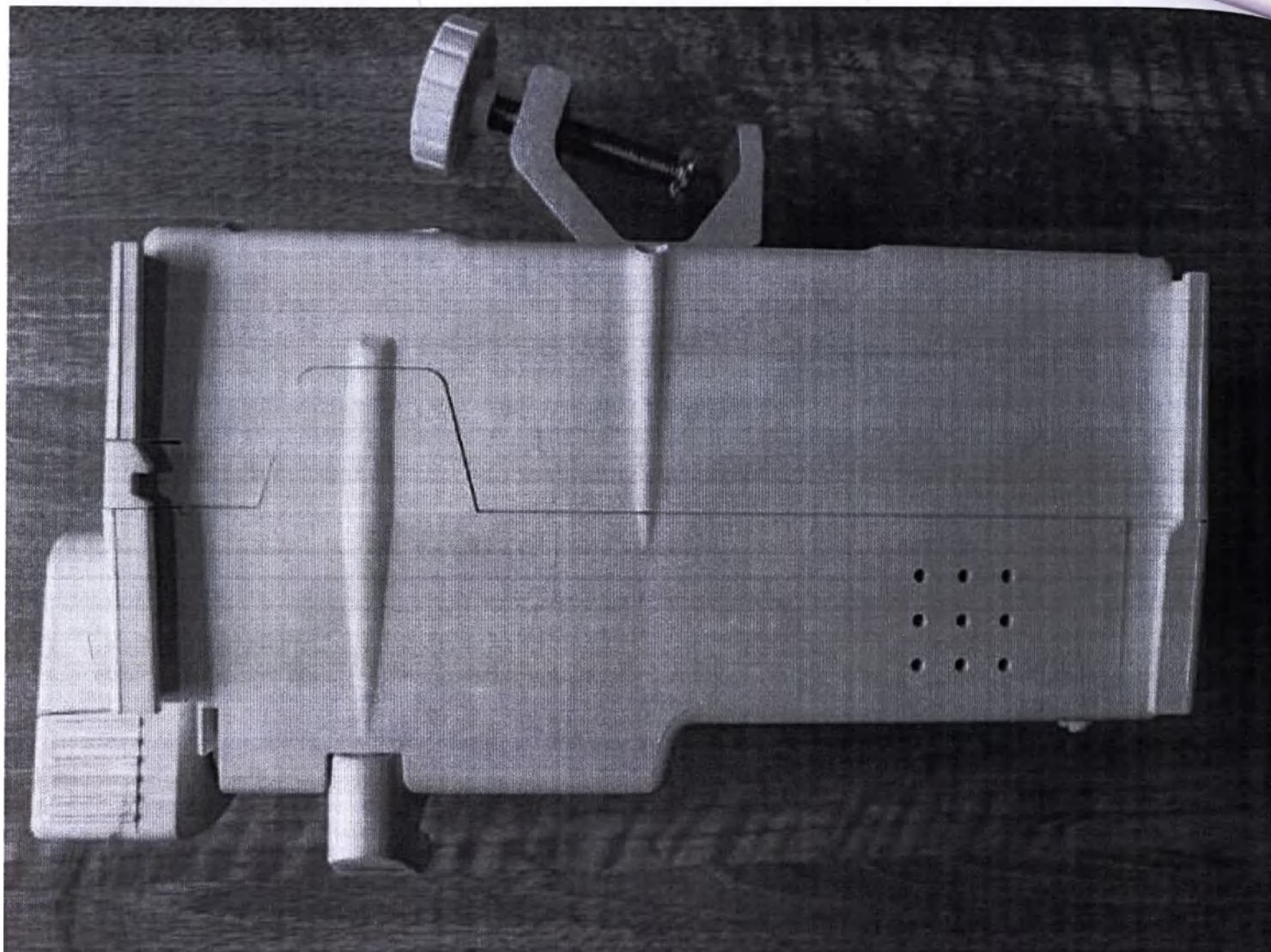


Насос шприцевой SPA112 (Вид снизу)

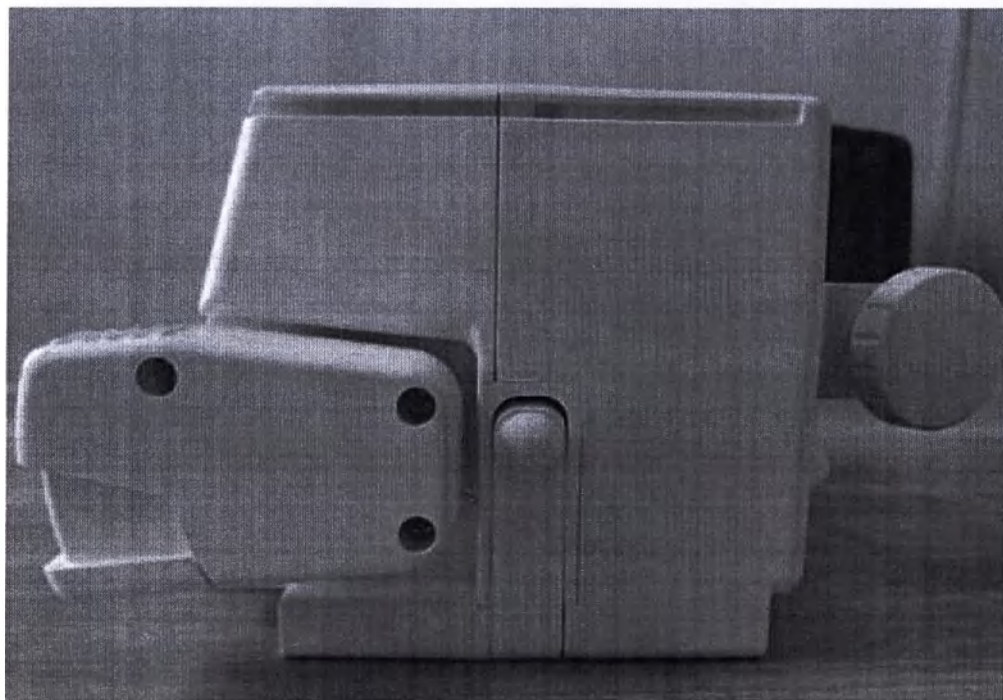


Насос шприцевой SPA112 (Вид справа)

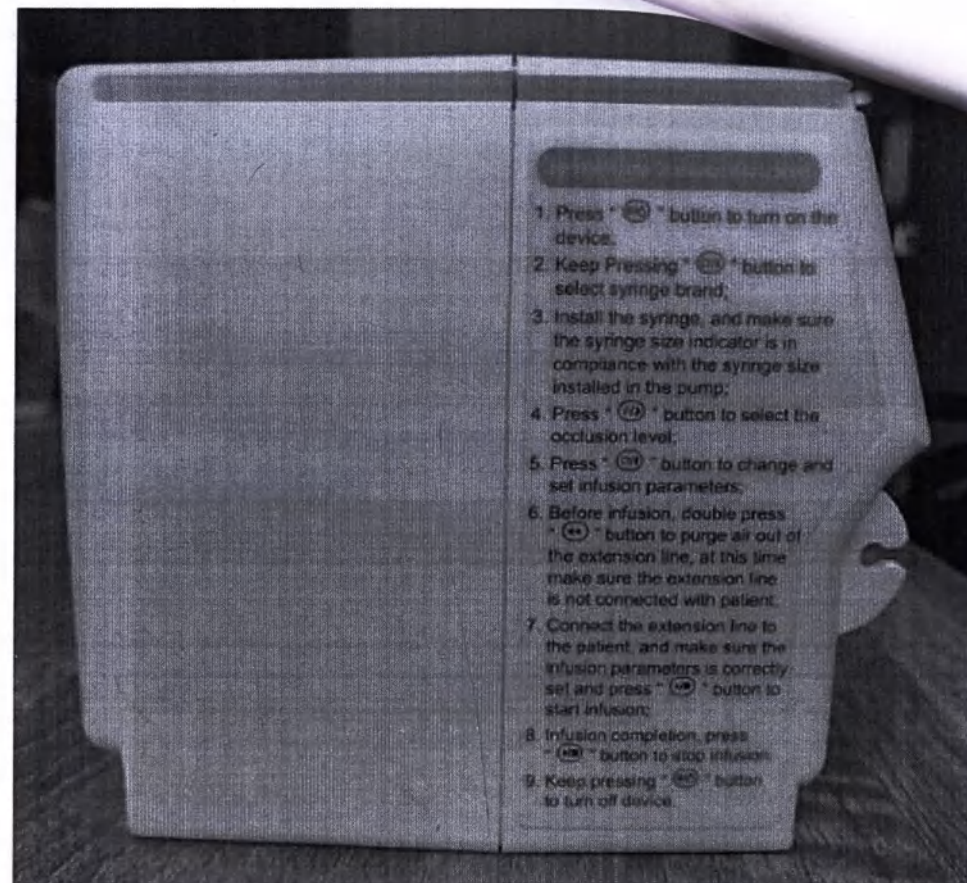


Насос шприцевой SPA112 (Вид слева)

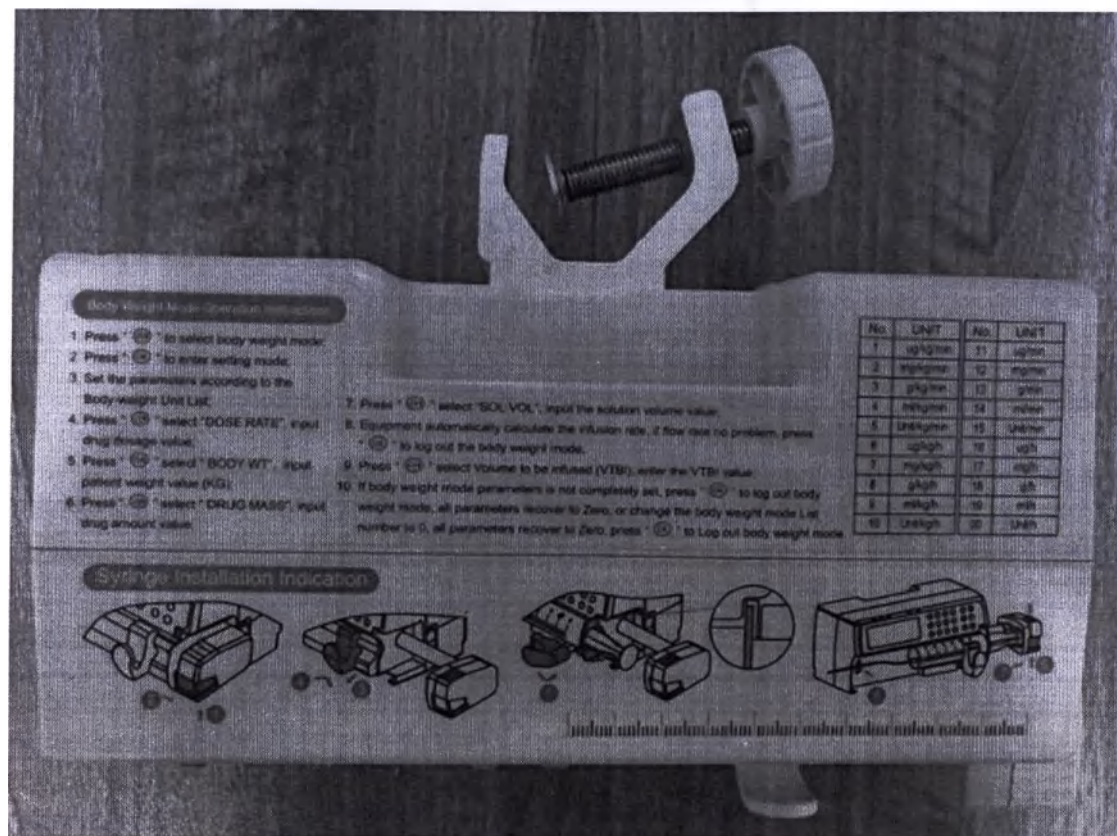

Насос шприцевой SPA112 (Вид сверху)

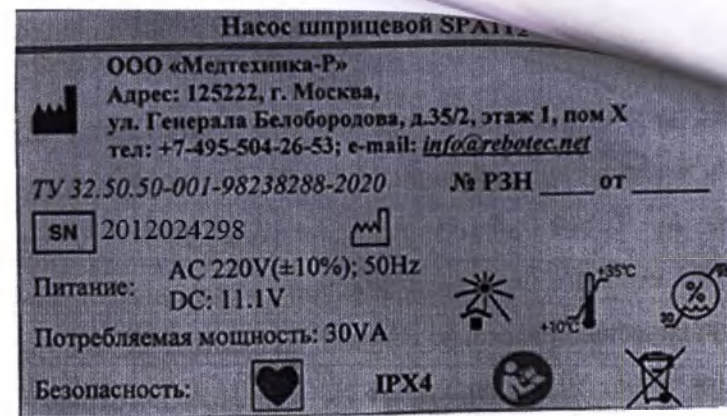


Образец маркировки для насоса SPA112

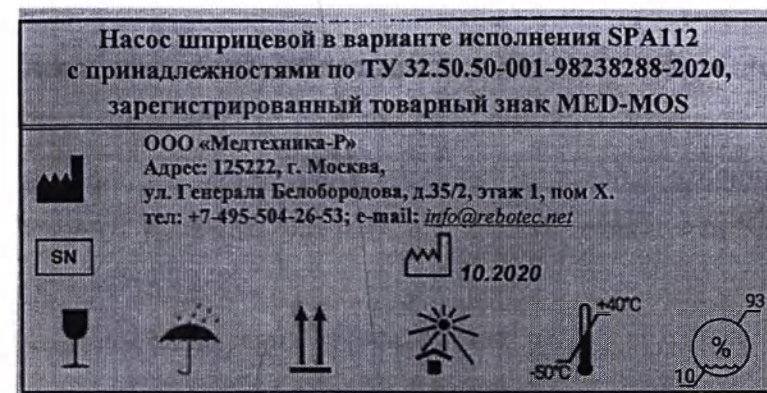


Образец транспортной маркировки для насоса SPA112




Сетевой кабель

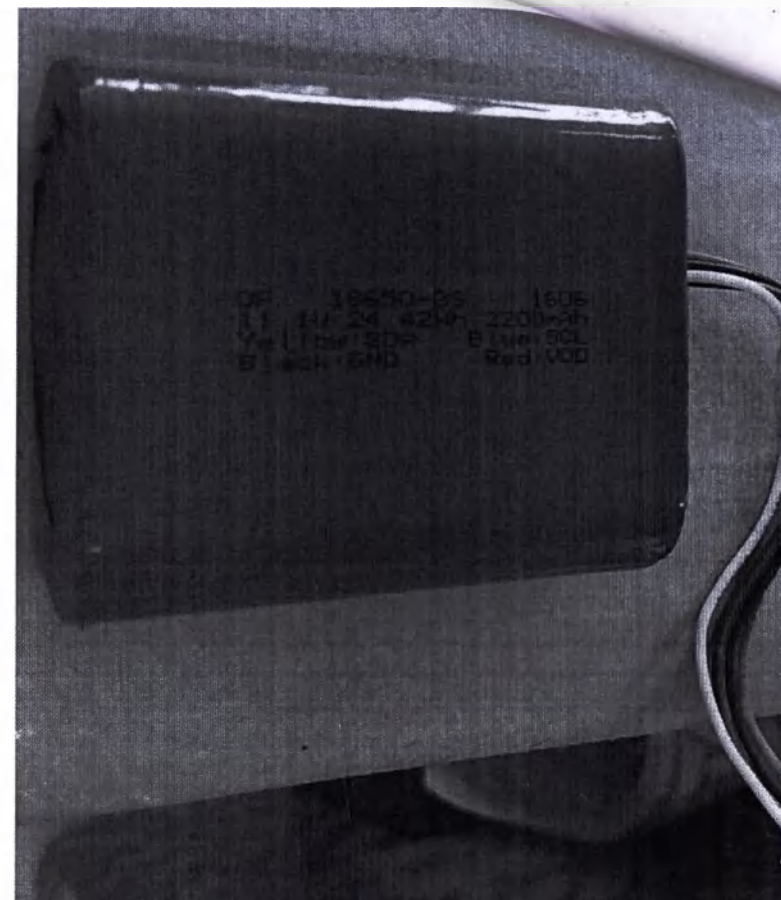

Внешний вид внутренней батареи для насоса
шприцевого SPA112

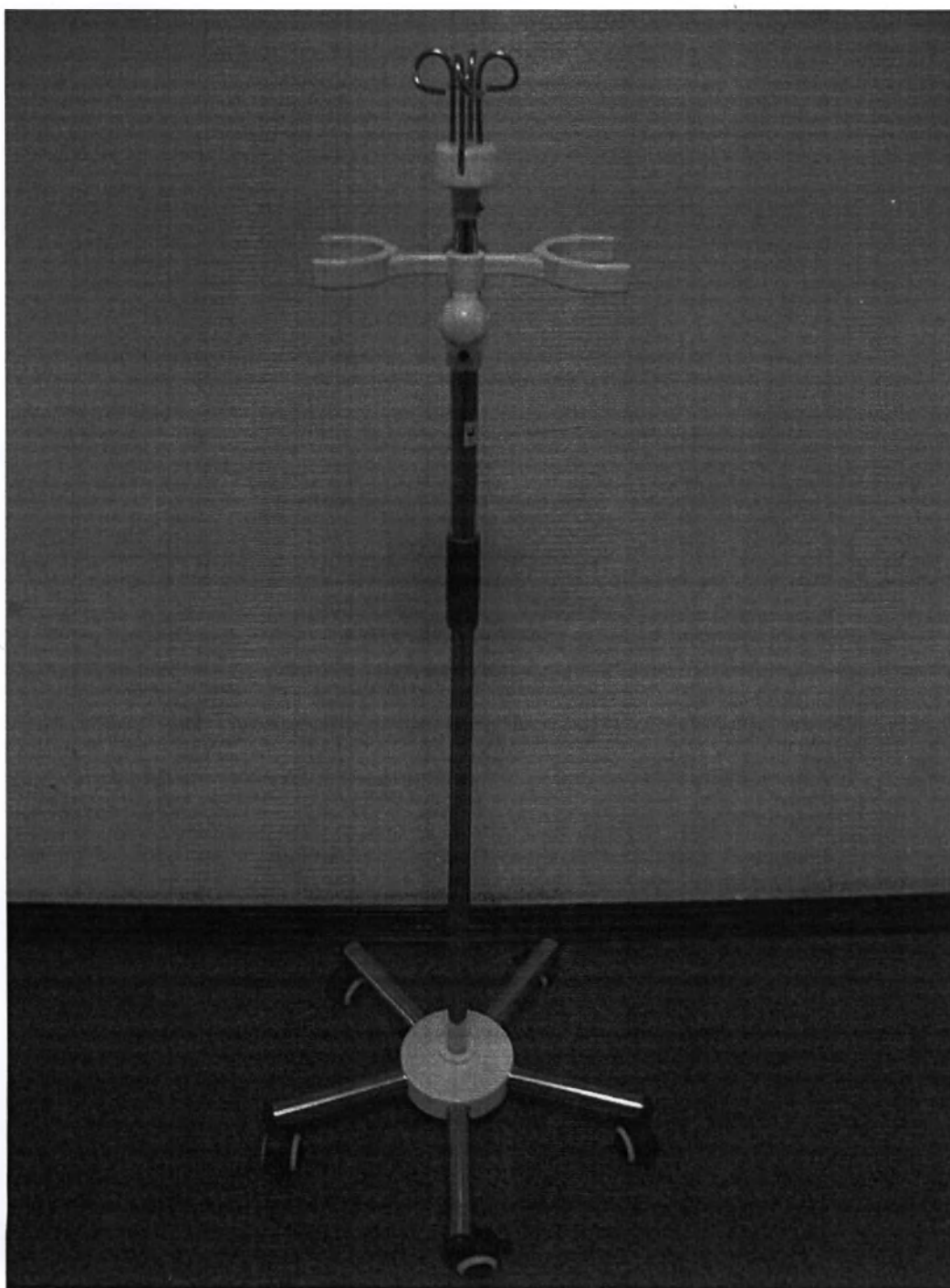

Внешний вид Стойка Telefussion

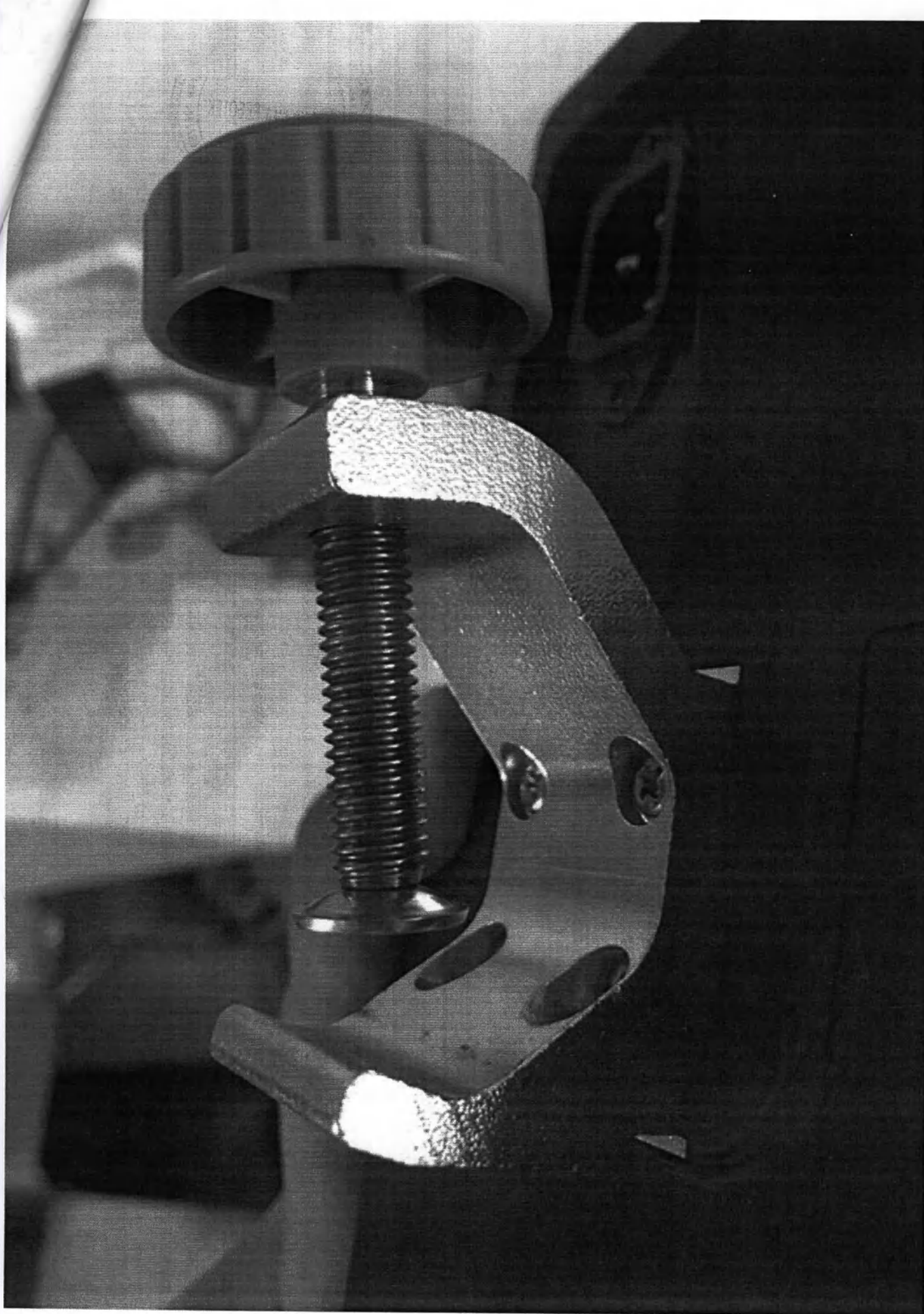

Фиксирующий механизм

