



7715-77
TYTEX

КОПИЯ

To whom it may concern

For registration purposes, please find attached:

English	Russian
Instruction for use	Инструкция по применению
Medical postoperative compression linen CAREFIX	Белье медицинское послеоперационное компрессионное CAREFIX

Issued and signed by
Bjarke Laust Haagensen
Compliance Manager

Tytex A/S
Industrivej 21
7430 Ikast
Denmark

2022-07-22

TYTEX


MAKING HEALTHCARE MORE HUMAN

Tytex A/S
Industrivej 21
DK-7430 Ikast

Tel. +45 9660 4200
Fax +45 9660 4201
info@tytex.dk

The Danish Chamber of Commerce do hereby
confirm that the company is known to us and registered
with the relevant Danish authorities.

Danish Chamber of Commerce
Secretary: Lone Andersen

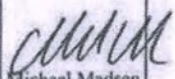APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)			
1. Country: Land:		Denmark Danmark	
This public document Dette offentlige dokument			
2. has been signed by er underskrevet af		Lone Andersen	
3. acting in the capacity of i egenskab af		Secretary Sekretær	
4. bears the seal/stamp of er forsynet med segl/stempel af		Danish Chamber of Commerce Dansk Erhverv	
Certified Attesteret			
5. at i	Copenhagen København	6. the den	17 Aug 2022 17 aug 2022
7. by af		Ministry of Foreign Affairs of Denmark Udenrigsministeriet	
8. No nr.		9F398A8D	
9. Seal/stamp: Segl/stempel:		10. Signature: Underskrift:	
		 Michael Madsen	



This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears. This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.

To verify the issuance of this Apostille, scan the QR code or visit the following website:

<https://e-register.um.dk>



Tytex A/S

Industrivej 21, 7430 Ikast, Дания

УТВЕРЖДЕНО

производителем

TUTEX

Инструкция по применению

**«Белье медицинское послеоперационное
компрессионное CAREFIX»**

Дата первоначального выпуска: 01.02.2021 г.

Оглавление

1. Наименование медицинского изделия	3
2. Сведения о производителе и изготовителе.....	3
3. Уполномоченный представитель изготовителя	3
4. Варианты исполнения медицинского изделия	3
5. Назначение медицинского изделия и принцип действия.....	4
5.1 Назначение.....	4
5.2 Принцип действия	16
5.2.1 Различные зоны плетения	16
5.2.2 Уровни компрессии.....	17
5.2.3 Уникальные технологии Tytex	17
6. Показания, противопоказания к применению, возможные побочные эффекты применения медицинского изделия	19
7. Информация об условиях применения и потенциальных потребителях медицинского изделия	21
8. Технические характеристики	21
8.1 Технические характеристики вариантов исполнения медицинского изделия	21
9. Подбор варианта исполнения и размера изделия, инструкция по надеванию изделия	21
10. Указания по эксплуатации	72
11. Указания по дезинфекции и стерилизации	73
12. Требования к техническому обслуживанию и ремонту медицинского изделия	73
13. Требования безопасности.....	73
14. Условия транспортирования	73
15. Условия хранения.....	73
16. Срок годности и гарантии изготовителя	74
17. Утилизация	74
18. Комплектность	74
19. Перечень международных, национальных нормативных документов/стандартов, которым соответствует медицинское изделие..	74
20. Рекламации	77

1. Наименование медицинского изделия

«Белье медицинское послеоперационное компрессионное CAREFIX»
(далее по тексту - медицинское изделие, продукция, белье Carefix, продукция Tytex).

2. Сведения о производителе и изготовителе

Ответственный производитель:

Наименование организации: Tytex A/S (Тайтекс А/С, Дания).

Адрес местонахождения: Industrivej 21, 7430 Ikast, Denmark (Индустривеж 21, 7430 Икаст, Дания)

Телефон: +45 9660 4200

Официальный сайт компании-производителя: <https://tytex.com/>;
<http://carefix.eu/>

Адрес электронной почты: mail@tytex.com

Место производства:

Tytex Slovakia s.r.o. (Тайтекс с.р.о., Словакия)

Адрес местонахождения: Chemlonská 1, 066 01 Humenné, Slovakia (Схемлонска 1, 066 01 Хуменне, Словакия)

3. Уполномоченный представитель изготовителя

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "РЭДЕКС"

Адрес: Россия, г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, д.13, стр. 15, помещение XI, комната 1

Контактный телефон: +7 (499) 370-00-33

E-mail: info@silimed-implant.ru

4. Варианты исполнения медицинского изделия

Tytex выпускает линейку бюстгалтеров Carefix. Линейка Carefix состоит из следующих вариантов исполнения:

Таблица 1. Варианты исполнения изделия

№	Вариант исполнения	Артик ул	Цвета	Размеры
1	Бюстгальтер послеоперационный Catia	3086	белый, черный	S, M, L, XL, 2XL
2	Бюстгальтер послеоперационный Bianca	3211	белый, черный	S, M, L, XL, 2XL, 3XL
3	Бюстгальтер послеоперационный Bella	3212	белый, черный, бежевый	XS, S, M, L, XL, 2XL

4	Бюстгальтер послеоперационный Anna	3270	белый, черный, бежевый	S, M, L, XL, 2XL
5	Бюстгальтер послеоперационный Alice	3291	белый, черный, бежевый	S, M, L, XL, 2XL
6	Бюстгальтер послеоперационный Sophia	3342	белый, черный	S, M, L, XL, 2XL, 3XL
7	Бюстгальтер послеоперационный Mary, со вкладышами анатомическими для бюстгальтера (артикул 8108)	3343	белый, черный, бежевый	S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL
8	Бюстгальтер послеоперационный Marianne, со вкладышами анатомическими для бюстгальтера (артикул 8108)	3373	белый	S, M, L, XL, 2XL
9	Бюстгальтер послеоперационный Ava	3444	белый, черный, бежевый	S, M, L, XL, 2XL
10	Бюстгальтер послеоперационный Lisa	3471	белый, черный	S, M, L, XL, 2XL, 3XL
11	Бюстгальтер послеоперационный Bonnie	3609	белый, черный	XS, S, M, L, XL, 2XL
12	Бюстгальтер послеоперационный Celia	5006	белый	S, M, L, XL, 2XL
13	Бюстгальтер послеоперационный Celia	5007	черный	S, M, L, XL, 2XL

5. Назначение медицинского изделия и принцип действия

5.1 Назначение

Белье медицинское послеоперационное компрессионное CAREFIX предназначено для проведения компрессионной терапии, поддержки, иммобилизации мягких тканей тела и снижения дискомфорта в период восстановления после общехирургических, реконструктивных и эстетических хирургических процедур в области груди.

Вкладыш анатомический для бюстгальтера предназначен для компенсации формы и объема молочной железы после мастэктомии или лампэктомии.

Медицинское изделие многоразового использования одним пациентом.

Описание функционального и медицинского назначения каждого артикула, доступные цветовые исполнения и размерный ряд приведены в Таблице 2.

Таблица 2. Медицинское назначение, функциональное назначение, цветовые исполнения и размерный ряд

Наименование	Артикул	Медицинское назначение	Функциональное назначение	Цветовое исполнение	Размерный ряд	Описание																																																																																																																				
Бюстгальтер послеоперационный Catia	3086	Для послеоперационного использования после операции на молочной железе или общехирургических операций, когда восстанавливается полная подвижность. Также подходит для лучевой терапии, так как бюстгальтер не содержит металлических деталей.	Основное назначение Catia - защищать, фиксировать и поддерживать грудь, обеспечивать быстрое заживление ран и обеспечивать оптимальный комфорт пользователя. При использовании может уменьшить шрам и сделать его практически незаметным.	Белый, черный	<table><tr><td>Обхват под грудью</td><td>CM</td><td>60 cm</td><td>65 cm</td><td>70 cm</td><td>75 cm</td><td>80 cm</td><td>85 cm</td><td>90 cm</td><td>95 cm</td><td>100 cm</td><td>105 cm</td><td>110 cm</td></tr><tr><td></td><td>IN</td><td>24 in</td><td>26 in</td><td>28 in</td><td>30 in</td><td>32 in</td><td>34 in</td><td>36 in</td><td>38 in</td><td>40 in</td><td>42 in</td><td>44 in</td></tr><tr><td rowspan="5">Размер Чашки</td><td>AA</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>A</td><td></td><td>S</td><td></td><td></td><td>M</td><td></td><td>L</td><td></td><td>XL</td><td></td><td>2XL</td></tr><tr><td>B</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>C</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>D</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>E</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Обхват под грудью	CM	60 cm	65 cm	70 cm	75 cm	80 cm	85 cm	90 cm	95 cm	100 cm	105 cm	110 cm		IN	24 in	26 in	28 in	30 in	32 in	34 in	36 in	38 in	40 in	42 in	44 in	Размер Чашки	AA												A		S			M		L		XL		2XL	B												C												D												E													Бюстгальтер не оснащен застежками																
Обхват под грудью	CM	60 cm	65 cm	70 cm	75 cm	80 cm	85 cm	90 cm	95 cm	100 cm	105 cm	110 cm																																																																																																														
	IN	24 in	26 in	28 in	30 in	32 in	34 in	36 in	38 in	40 in	42 in	44 in																																																																																																														
Размер Чашки	AA																																																																																																																									
	A		S			M		L		XL		2XL																																																																																																														
	B																																																																																																																									
	C																																																																																																																									
	D																																																																																																																									
E																																																																																																																										
Бюстгальтер послеоперационный Bianca	3211	Для послеоперационного использования после операции на молочной железе и/или во время лучевой терапии, так как бюстгальтер не содержит металлических деталей.	Основное назначение Bianca - защищать, фиксировать и поддерживать грудь, обеспечивать быстрое заживление ран и обеспечивать оптимальный комфорт пользователя. При использовании может уменьшить шрам и сделать его практически незаметным.	Белый, черный	<table><tr><td>Обхват под грудью</td><td>CM</td><td>65 cm</td><td>70 cm</td><td>75 cm</td><td>80 cm</td><td>85 cm</td><td>90 cm</td><td>95 cm</td><td>100 cm</td><td>105 cm</td><td>110 cm</td><td>115 cm</td><td>120 cm</td><td>125 cm</td></tr><tr><td></td><td>IN</td><td>26 in</td><td>28 in</td><td>30 in</td><td>32 in</td><td>34 in</td><td>36 in</td><td>38 in</td><td>40 in</td><td>42 in</td><td>44 in</td><td>46 in</td><td>48 in</td><td>50 in</td></tr><tr><td rowspan="5">Размер Чашки</td><td>AA</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>A</td><td></td><td>S</td><td></td><td></td><td>M</td><td></td><td>L</td><td></td><td>XL</td><td></td><td>2XL</td><td></td><td>3XL</td></tr><tr><td>B</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>C</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>D</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>E</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Обхват под грудью	CM	65 cm	70 cm	75 cm	80 cm	85 cm	90 cm	95 cm	100 cm	105 cm	110 cm	115 cm	120 cm	125 cm		IN	26 in	28 in	30 in	32 in	34 in	36 in	38 in	40 in	42 in	44 in	46 in	48 in	50 in	Размер Чашки	AA														A		S			M		L		XL		2XL		3XL	B														C														D														E															Бюстгальтер оснащен текстильной застежкой спереди
Обхват под грудью	CM	65 cm	70 cm	75 cm	80 cm	85 cm	90 cm	95 cm	100 cm	105 cm	110 cm	115 cm	120 cm	125 cm																																																																																																												
	IN	26 in	28 in	30 in	32 in	34 in	36 in	38 in	40 in	42 in	44 in	46 in	48 in	50 in																																																																																																												
Размер Чашки	AA																																																																																																																									
	A		S			M		L		XL		2XL		3XL																																																																																																												
	B																																																																																																																									
	C																																																																																																																									
	D																																																																																																																									
E																																																																																																																										

			незаметным. Bianca разработан для закрытия всей оперированной области, включая подмышки, чтобы обеспечить наилучшую защиту, компрессию и поддержку, способствуя ускорению процесса восстановления. Благодаря тонкому балансу между компрессией и поддержкой, Bianca уменьшает вредное накопление крови и тканевых жидкостей, что сводит к минимуму послеоперационный отек и риск инфекции, а также улучшает циркуляцию крови и заживление ран.																																																																																																															
Бюстгальтер послеоперационный Bella	3212	Для послеоперационного применения после операции на молочной железе	Основное назначение Bella - фиксировать и поддерживать грудь, обеспечивать быстрое заживление ран и обеспечивать оптимальный комфорт пользователя. При использовании может уменьшить шрам и сделать его практически незаметным. Bella	Белый, черный, бежевый	<table><tr><td>Обхват под грудью</td><td>CM</td><td>60 cm</td><td>65 cm</td><td>70 cm</td><td>75 cm</td><td>80 cm</td><td>85 cm</td><td>90 cm</td><td>95 cm</td><td>100 cm</td><td>105 cm</td><td>110 cm</td><td>115 cm</td></tr><tr><td></td><td>IN</td><td>24 in</td><td>26 in</td><td>28 in</td><td>30 in</td><td>32 in</td><td>34 in</td><td>36 in</td><td>38 in</td><td>40 in</td><td>42 in</td><td>44 in</td><td>46 in</td></tr><tr><td rowspan="5">Размер Чашки</td><td>AA</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>A</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>B</td><td>XS</td><td>S</td><td></td><td>M</td><td></td><td></td><td>L</td><td></td><td>XL</td><td></td><td>2XL</td><td></td></tr><tr><td>C</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>D</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>E</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Обхват под грудью	CM	60 cm	65 cm	70 cm	75 cm	80 cm	85 cm	90 cm	95 cm	100 cm	105 cm	110 cm	115 cm		IN	24 in	26 in	28 in	30 in	32 in	34 in	36 in	38 in	40 in	42 in	44 in	46 in	Размер Чашки	AA													A													B	XS	S		M			L		XL		2XL		C													D													E														Бюстгальтер оснащен спереди застежкой на крючки-петли, петли расположены в 2 рядах по 8 штук для регулирования обхвата
Обхват под грудью	CM	60 cm	65 cm	70 cm	75 cm	80 cm	85 cm	90 cm	95 cm	100 cm	105 cm	110 cm	115 cm																																																																																																					
	IN	24 in	26 in	28 in	30 in	32 in	34 in	36 in	38 in	40 in	42 in	44 in	46 in																																																																																																					
Размер Чашки	AA																																																																																																																	
	A																																																																																																																	
	B	XS	S		M			L		XL		2XL																																																																																																						
	C																																																																																																																	
	D																																																																																																																	
E																																																																																																																		

			разработан для закрытия всей оперированной области, включая подмышки, чтобы обеспечить наилучшую защиту, компрессию и поддержку, способствуя ускорению процесса восстановления.Благодаря тонкому балансу между компрессией и поддержкой, Biana уменьшает вредное накопление крови и тканевых жидкостей, что сводит к минимуму послеоперационный отек и риск инфекции, а также улучшает циркуляцию крови и заживление ран.																																																																																														
Бюстгальтер послеоперационный Anna	3270	Для послеоперационного применения после операции на молочной железе	Основное назначение Anna - защищать, фиксировать и поддерживать грудь, обеспечивать быстрое заживление ран и обеспечивать оптимальный комфорт пользователя. При использовании может уменьшить шрам и сделать его практически незаметным.	Белый, черный, бежевый	<table><tr><td>Обхват под грудью</td><td>CM</td><td>70 cm</td><td>75 cm</td><td>80 cm</td><td>85 cm</td><td>90 cm</td><td>95 cm</td><td>100 cm</td><td>105 cm</td><td>110 cm</td><td>115 cm</td></tr><tr><td></td><td>IN</td><td>28 in</td><td>30 in</td><td>32 in</td><td>34 in</td><td>36 in</td><td>38 in</td><td>40 in</td><td>42 in</td><td>44 in</td><td>46 in</td></tr><tr><td rowspan="6">Размер Чашки</td><td>AA</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>A</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>B</td><td>S</td><td></td><td>M</td><td></td><td>L</td><td></td><td>XL</td><td></td><td>2XL</td><td></td></tr><tr><td>C</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>D</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>E</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Обхват под грудью	CM	70 cm	75 cm	80 cm	85 cm	90 cm	95 cm	100 cm	105 cm	110 cm	115 cm		IN	28 in	30 in	32 in	34 in	36 in	38 in	40 in	42 in	44 in	46 in	Размер Чашки	AA											A											B	S		M		L		XL		2XL		C											D											E											Бюстгальтер оснащен спереди застежкой на крючки-петли и молнией
Обхват под грудью	CM	70 cm	75 cm	80 cm	85 cm	90 cm	95 cm	100 cm	105 cm	110 cm	115 cm																																																																																						
	IN	28 in	30 in	32 in	34 in	36 in	38 in	40 in	42 in	44 in	46 in																																																																																						
Размер Чашки	AA																																																																																																
	A																																																																																																
	B	S		M		L		XL		2XL																																																																																							
	C																																																																																																
	D																																																																																																
	E																																																																																																

Бюстгальтер послеоперационный Alice	3291	Для послеоперационного применения после операции на молочной железе	Основное назначение Alice - защищать, фиксировать и поддерживать грудь, обеспечивать быстрое заживление ран и обеспечивать оптимальный комфорт пользователя. При использовании может уменьшить шрам и сделать его практически незаметным.	Белый, черный, бежевый	<table><tr><td rowspan="2">Обхват под грудью</td><td>CM</td><td>70 cm</td><td>75 cm</td><td>80 cm</td><td>85 cm</td><td>90 cm</td><td>95 cm</td><td>100 cm</td><td>105 cm</td><td>110 cm</td><td>115 cm</td></tr><tr><td>IN</td><td>28 in</td><td>30 in</td><td>32 in</td><td>34 in</td><td>36 in</td><td>38 in</td><td>40 in</td><td>42 in</td><td>44 in</td><td>46 in</td></tr><tr><td rowspan="6">Размер Чашки</td><td>AA</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>A</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>B</td><td>S</td><td></td><td>M</td><td></td><td>L</td><td></td><td>XL</td><td></td><td>2XL</td><td></td></tr><tr><td>C</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>D</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>E</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Обхват под грудью	CM	70 cm	75 cm	80 cm	85 cm	90 cm	95 cm	100 cm	105 cm	110 cm	115 cm	IN	28 in	30 in	32 in	34 in	36 in	38 in	40 in	42 in	44 in	46 in	Размер Чашки	AA											A											B	S		M		L		XL		2XL		C											D											E											Бюстгальтер оснащен спереди застежкой на крючки-петли, петли расположены в 2 рядах по 8 штук для регулирования обхвата																								
Обхват под грудью	CM	70 cm	75 cm	80 cm	85 cm		90 cm	95 cm	100 cm	105 cm	110 cm	115 cm																																																																																																												
	IN	28 in	30 in	32 in	34 in	36 in	38 in	40 in	42 in	44 in	46 in																																																																																																													
Размер Чашки	AA																																																																																																																							
	A																																																																																																																							
	B	S		M		L		XL		2XL																																																																																																														
	C																																																																																																																							
	D																																																																																																																							
	E																																																																																																																							
Бюстгальтер послеоперационный Sophia	3342	Для послеоперационного применения после операции на молочной железе, особенно после мастэктомии	Основное назначение Sophia - зафиксировать и поддержать как оперированную, так и опухшую грудь, а также здоровую грудь, помочь быстрому заживлению ран и обеспечить оптимальный комфорт пользователя. При использовании может уменьшить шрам и сделать его практически незаметным. Благодаря компрессии, Sophia уменьшает вредное накопление крови и тканевых жидкостей, что сводит к минимуму послеоперационный отек и риск инфекции, а также улучшает	Белый, черный	<table><tr><td rowspan="2">Обхват под грудью</td><td>CM</td><td>60 cm</td><td>65 cm</td><td>70 cm</td><td>75 cm</td><td>80 cm</td><td>85 cm</td><td>90 cm</td><td>95 cm</td><td>100 cm</td><td>105 cm</td><td>110 cm</td><td>115 cm</td><td>120 cm</td></tr><tr><td>IN</td><td>24 in</td><td>26 in</td><td>28 in</td><td>30 in</td><td>32 in</td><td>34 in</td><td>36 in</td><td>38 in</td><td>40 in</td><td>42 in</td><td>44 in</td><td>46 in</td><td>48 in</td></tr><tr><td rowspan="6">Размер Чашки</td><td>AA</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>A</td><td></td><td>S</td><td></td><td>M</td><td></td><td>L</td><td></td><td>XL</td><td></td><td>2XL</td><td></td><td>3XL</td><td></td></tr><tr><td>B</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>C</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>D</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>E</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Обхват под грудью	CM	60 cm	65 cm	70 cm	75 cm	80 cm	85 cm	90 cm	95 cm	100 cm	105 cm	110 cm	115 cm	120 cm	IN	24 in	26 in	28 in	30 in	32 in	34 in	36 in	38 in	40 in	42 in	44 in	46 in	48 in	Размер Чашки	AA														A		S		M		L		XL		2XL		3XL		B														C														D														E														Бюстгальтер оснащен спереди застежкой на крючки-петли и молнией, лямки оснащены текстильным и застежками
Обхват под грудью	CM	60 cm	65 cm	70 cm	75 cm		80 cm	85 cm	90 cm	95 cm	100 cm	105 cm	110 cm	115 cm	120 cm																																																																																																									
	IN	24 in	26 in	28 in	30 in	32 in	34 in	36 in	38 in	40 in	42 in	44 in	46 in	48 in																																																																																																										
Размер Чашки	AA																																																																																																																							
	A		S		M		L		XL		2XL		3XL																																																																																																											
	B																																																																																																																							
	C																																																																																																																							
	D																																																																																																																							
	E																																																																																																																							

			циркуляцию крови и заживление ран.																																																																																																																																													
Бюстгальтер послеоперационный Магу	3343	Для послеоперационного применения после операций на молочной железе, особенно мастэктомии и лампэктомии. Он разработан для закрытия всей оперированной области, включая подмышки, чтобы обеспечить наилучшую защиту, компрессию и поддержку, способствуя ускорению процесса восстановления	Основное назначение Магу - зафиксировать и поддержать как оперированную, так и здоровую грудь, помочь быстрому заживлению ран и обеспечить оптимальный комфорт пользователя. При использовании может уменьшить шрам и сделать его практически незаметным. Благодаря компрессии, Магу уменьшает вредное накопление крови и тканевых жидкостей, что сводит к минимуму послеоперационный отек и риск инфекции, а также улучшает циркуляцию крови и заживление ран.	Белый, черный, бежевый	<table><tr><th>Обхват под грудью</th><th>CM</th><th>70 cm</th><th>75 cm</th><th>80 cm</th><th>85 cm</th><th>90 cm</th><th>95 cm</th><th>100 cm</th><th>105 cm</th><th>110 cm</th><th>115 cm</th><th>120 cm</th><th>125 cm</th><th>130 cm</th><th>135 cm</th></tr><tr><th>IN</th><th>28 in</th><th>30 in</th><th>32 in</th><th>34 in</th><th>36 in</th><th>38 in</th><th>40 in</th><th>42 in</th><th>44 in</th><th>46 in</th><th>48 in</th><th>50 in</th><th>52 in</th><th>54 in</th><th></th></tr><tr><th rowspan="7">Размер Чашки</th><td>AA</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>A</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>B</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>C</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>D</td><td>M</td><td></td><td></td><td>L</td><td></td><td></td><td>XL</td><td>2XL</td><td>3XL</td><td></td><td></td><td>4XL</td><td></td><td></td></tr><tr><td>E</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>F</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Обхват под грудью	CM	70 cm	75 cm	80 cm	85 cm	90 cm	95 cm	100 cm	105 cm	110 cm	115 cm	120 cm	125 cm	130 cm	135 cm	IN	28 in	30 in	32 in	34 in	36 in	38 in	40 in	42 in	44 in	46 in	48 in	50 in	52 in	54 in		Размер Чашки	AA															A															B															C															D	M			L			XL	2XL	3XL			4XL			E															F															Бюстгальтер оснащен спереди застежкой на крючки-петли, петли расположены в 2 рядах по 8 штук для регулирования обхвата, лямки отстегиваются, есть карманы для вкладышей для бюстгальтера
Обхват под грудью	CM	70 cm	75 cm	80 cm	85 cm	90 cm	95 cm	100 cm	105 cm	110 cm	115 cm	120 cm	125 cm	130 cm	135 cm																																																																																																																																	
IN	28 in	30 in	32 in	34 in	36 in	38 in	40 in	42 in	44 in	46 in	48 in	50 in	52 in	54 in																																																																																																																																		
Размер Чашки	AA																																																																																																																																															
	A																																																																																																																																															
	B																																																																																																																																															
	C																																																																																																																																															
	D	M			L			XL	2XL	3XL			4XL																																																																																																																																			
	E																																																																																																																																															
	F																																																																																																																																															

Бюстгальтер послеоперационный Marianne	3373	для послеоперационного применения после операций на молочной железе, особенно мастэктомии и лампэктомии. Он предназначен для фиксации дренажа с помощью петель, к которым могут быть прикреплены дренажные трубки. Петли можно легко снять, как только дренаж будет завершен.	Основное назначение Marianne - зафиксировать и поддержать как оперированную, так и здоровую грудь, помочь быстрому заживлению ран и обеспечить оптимальный комфорт пользователя. При использовании может уменьшить шрам и сделать его практически незаметным. Marianne закрывает всю оперированную область, включая подмышки, чтобы обеспечить наилучшую защиту, компрессию и поддержку, способствуя ускорению процесса восстановления. Благодаря компрессии, Marianne уменьшает вредное накопление крови и тканевых жидкостей, что сводит к минимуму послеоперационный отек и риск инфекции, а также улучшает циркуляцию крови и заживление ран.	Белый	<table><tr><th>Обхват под грудью</th><th>CM</th><th>70 cm</th><th>75 cm</th><th>80 cm</th><th>85 cm</th><th>90 cm</th><th>95 cm</th><th>100 cm</th><th>105 cm</th><th>110 cm</th><th>115 cm</th></tr><tr><th></th><th>IN</th><th>28 in</th><th>30 in</th><th>32 in</th><th>34 in</th><th>36 in</th><th>38 in</th><th>40 in</th><th>42 in</th><th>44 in</th><th>46 in</th></tr><tr><td rowspan="6">Размер Чашки</td><td>AA</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>A</td><td>S</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>B</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>C</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>D</td><td>M</td><td></td><td></td><td>L</td><td></td><td></td><td>XL</td><td></td><td>2XL</td><td></td></tr><tr><td>E</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Обхват под грудью	CM	70 cm	75 cm	80 cm	85 cm	90 cm	95 cm	100 cm	105 cm	110 cm	115 cm		IN	28 in	30 in	32 in	34 in	36 in	38 in	40 in	42 in	44 in	46 in	Размер Чашки	AA											A	S										B											C											D	M			L			XL		2XL		E											Бюстгальтер оснащен спереди застежкой на крючки-петли, петли расположены в 2 рядах по 8 штук для регулирования обхвата, лямки отстегиваются, есть карманы для вкладышей для бюстгальтера, петля для дренажа
Обхват под грудью	CM	70 cm	75 cm	80 cm	85 cm	90 cm	95 cm	100 cm	105 cm	110 cm	115 cm																																																																																						
	IN	28 in	30 in	32 in	34 in	36 in	38 in	40 in	42 in	44 in	46 in																																																																																						
Размер Чашки	AA																																																																																																
	A	S																																																																																															
	B																																																																																																
	C																																																																																																
	D	M			L			XL		2XL																																																																																							
	E																																																																																																

Бюстгальтер послеоперационный Ava	3444	Для послеоперационного применения после косметической операции на молочной железе, особенно при увеличении, уменьшении, подтяжке или реконструкции груди.	Основное назначение Ava - зафиксировать и поддержать грудь, помочь быстрому заживлению ран и обеспечить оптимальный комфорт пользователя. При использовании может уменьшить шрам и сделать его практически незаметным. Благодаря интегрированным зонам поддержки под бюстом и формирующим особенностям в целом Ava поддерживает, скульптурирует и конкурирует грудь, тем самым обеспечивая наилучший хирургический результат. Обеспечивая превосходную поддержку, Ava также помогает очень важному процессу заживления послеоперационных ран, уменьшая вредное накопление крови и тканевых жидкостей, что сводит к минимуму послеоперационный	Белый, черный, бежевый	<table><tr><th>Обхват под грудью</th><th>CM</th><th>65 cm</th><th>70 cm</th><th>75 cm</th><th>80 cm</th><th>85 cm</th><th>90 cm</th><th>95 cm</th><th>100 cm</th><th>105 cm</th><th>110 cm</th><th>115 cm</th><th>120 cm</th><th>125 cm</th><th>130 cm</th></tr><tr><th>IN</th><th></th><th>26 in</th><th>28 in</th><th>30 in</th><th>32 in</th><th>34 in</th><th>36 in</th><th>38 in</th><th>40 in</th><th>42 in</th><th>44 in</th><th>46 in</th><th>48 in</th><th>50 in</th><th>52 in</th></tr><tr><td rowspan="6">Размер Чашки</td><td>A</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>B</td><td></td><td></td><td>S (Cup A-C)</td><td>M (Cup A-C)</td><td></td><td>L (Cup A-C)</td><td></td><td></td><td></td><td>XL (Cup A-C)</td><td></td><td></td><td>2XL (Cup A-C)</td><td></td></tr><tr><td>C</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>D</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>E</td><td></td><td></td><td>S (Cup D-F)</td><td>M (Cup D-F)</td><td></td><td>L (Cup D-F)</td><td></td><td></td><td>XL (Cup D-F)</td><td></td><td></td><td>2XL (Cup D-F)</td><td></td><td></td></tr><tr><td>F</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Обхват под грудью	CM	65 cm	70 cm	75 cm	80 cm	85 cm	90 cm	95 cm	100 cm	105 cm	110 cm	115 cm	120 cm	125 cm	130 cm	IN		26 in	28 in	30 in	32 in	34 in	36 in	38 in	40 in	42 in	44 in	46 in	48 in	50 in	52 in	Размер Чашки	A															B			S (Cup A-C)	M (Cup A-C)		L (Cup A-C)				XL (Cup A-C)			2XL (Cup A-C)		C															D															E			S (Cup D-F)	M (Cup D-F)		L (Cup D-F)			XL (Cup D-F)			2XL (Cup D-F)			F															Бюстгальтер оснащен спереди застежкой на крючки-петли и молнией, лямки отстегиваются
Обхват под грудью	CM	65 cm	70 cm	75 cm	80 cm	85 cm	90 cm	95 cm	100 cm	105 cm	110 cm	115 cm	120 cm	125 cm	130 cm																																																																																																																		
IN		26 in	28 in	30 in	32 in	34 in	36 in	38 in	40 in	42 in	44 in	46 in	48 in	50 in	52 in																																																																																																																		
Размер Чашки	A																																																																																																																																
	B			S (Cup A-C)	M (Cup A-C)		L (Cup A-C)				XL (Cup A-C)			2XL (Cup A-C)																																																																																																																			
	C																																																																																																																																
	D																																																																																																																																
	E			S (Cup D-F)	M (Cup D-F)		L (Cup D-F)			XL (Cup D-F)			2XL (Cup D-F)																																																																																																																				
	F																																																																																																																																

			отек и риск инфекции и в то же время улучшает кровообращение.																																																																																																																						
Бюстгальтер послеоперационный Lisa	3471	Для послеоперационного применения после операций на молочной железе, особенно лампэктомии. Он разработан для закрытия всей оперированной области, включая подмышки, чтобы обеспечить наилучшую защиту, компрессию и поддержку, способствуя ускорению процесса восстановления	Основное назначение Lisa - зафиксировать и поддержать грудь, помочь быстрому заживлению ран и обеспечить оптимальный комфорт пользователя. При использовании может уменьшить шрам и сделать его практически незаметным. Благодаря компрессии, Lisa уменьшает вредное накопление крови и тканевых жидкостей, что сводит к минимуму послеоперационный отек и риск инфекции, а также улучшает циркуляцию крови и заживление ран.	Белый, черный	<table><tr><td>Обхват под грудью</td><td>CM</td><td>60 cm</td><td>65 cm</td><td>70 cm</td><td>75 cm</td><td>80 cm</td><td>85 cm</td><td>90 cm</td><td>95 cm</td><td>100 cm</td><td>105 cm</td><td>110 cm</td><td>115 cm</td><td>120 cm</td></tr><tr><td></td><td>IN</td><td>24 in</td><td>26 in</td><td>28 in</td><td>30 in</td><td>32 in</td><td>34 in</td><td>36 in</td><td>38 in</td><td>40 in</td><td>42 in</td><td>44 in</td><td>46 in</td><td>48 in</td></tr><tr><td rowspan="6">Размер Чашки</td><td>AA</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>A</td><td></td><td>A(Cup AA-B)</td><td></td><td>M(Cup AA-B)</td><td></td><td>L(Cup AA-B)</td><td></td><td>XL(Cup AA-B)</td><td></td><td>2XL(Cup AA-B)</td><td></td><td>3XL(Cup AA-B)</td><td></td></tr><tr><td>B</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>C</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>D</td><td></td><td>D(Cup C-E)</td><td></td><td>M(Cup C-E)</td><td></td><td>L(Cup C-E)</td><td></td><td>XL(Cup C-E)</td><td></td><td>2XL(Cup C-E)</td><td></td><td>3XL(Cup C-E)</td><td></td></tr><tr><td>E</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Обхват под грудью	CM	60 cm	65 cm	70 cm	75 cm	80 cm	85 cm	90 cm	95 cm	100 cm	105 cm	110 cm	115 cm	120 cm		IN	24 in	26 in	28 in	30 in	32 in	34 in	36 in	38 in	40 in	42 in	44 in	46 in	48 in	Размер Чашки	AA														A		A(Cup AA-B)		M(Cup AA-B)		L(Cup AA-B)		XL(Cup AA-B)		2XL(Cup AA-B)		3XL(Cup AA-B)		B														C														D		D(Cup C-E)		M(Cup C-E)		L(Cup C-E)		XL(Cup C-E)		2XL(Cup C-E)		3XL(Cup C-E)		E														Бюстгальтер оснащен спереди застежкой на крючки-петли и молнией, лямки оснащены текстильным и застежками
Обхват под грудью	CM	60 cm	65 cm	70 cm	75 cm	80 cm	85 cm	90 cm	95 cm	100 cm	105 cm	110 cm	115 cm	120 cm																																																																																																											
	IN	24 in	26 in	28 in	30 in	32 in	34 in	36 in	38 in	40 in	42 in	44 in	46 in	48 in																																																																																																											
Размер Чашки	AA																																																																																																																								
	A		A(Cup AA-B)		M(Cup AA-B)		L(Cup AA-B)		XL(Cup AA-B)		2XL(Cup AA-B)		3XL(Cup AA-B)																																																																																																												
	B																																																																																																																								
	C																																																																																																																								
	D		D(Cup C-E)		M(Cup C-E)		L(Cup C-E)		XL(Cup C-E)		2XL(Cup C-E)		3XL(Cup C-E)																																																																																																												
	E																																																																																																																								

Бюстгальтер послеоперационный Bonnie	3609	Для послеоперационного использования после операции на молочной железе.	Основное назначение Bonnie - зафиксировать и поддержать грудь, помочь быстрому заживлению ран и обеспечить оптимальный комфорт пользователя. При использовании может уменьшить шрам и сделать его практически незаметным. Bonnie закрывает всю оперированную область, включая подмышки, чтобы обеспечить наилучшую защиту, компрессию и поддержку, способствуя ускорению процесса восстановления. Благодаря тонкому балансу между компрессией и поддержкой, Bonnie уменьшает вредное накопление крови и тканевых жидкостей, что сводит к минимуму послеоперационный отек и риск инфекции, а также улучшает циркуляцию крови и заживление ран.	Белый, черный	<table><tr><th rowspan="2">Обхват под грудью</th><th>CM</th><th>60 cm</th><th>65 cm</th><th>70 cm</th><th>75 cm</th><th>80 cm</th><th>85 cm</th><th>90 cm</th><th>95 cm</th><th>100 cm</th><th>105 cm</th><th>110 cm</th><th>115 cm</th></tr><tr><th>IN</th><th>24 in</th><th>26 in</th><th>28 in</th><th>30 in</th><th>32 in</th><th>34 in</th><th>36 in</th><th>38 in</th><th>40 in</th><th>42 in</th><th>44 in</th><th>46 in</th></tr><tr><th rowspan="6">Размер Чашки</th><td>AA</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>A</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>B</td><td></td><td>XS</td><td></td><td>S</td><td></td><td>M</td><td></td><td>L</td><td></td><td>XL</td><td></td><td>2XL</td></tr><tr><td>C</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>D</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>E</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Обхват под грудью	CM	60 cm	65 cm	70 cm	75 cm	80 cm	85 cm	90 cm	95 cm	100 cm	105 cm	110 cm	115 cm	IN	24 in	26 in	28 in	30 in	32 in	34 in	36 in	38 in	40 in	42 in	44 in	46 in	Размер Чашки	AA													A													B		XS		S		M		L		XL		2XL	C													D													E													Бюстгальтер оснащен застежкой на крючки-петли, петли расположены в 2 рядах по 8 штук для регулирования обхвата, лямки отстегиваются
Обхват под грудью	CM	60 cm	65 cm	70 cm	75 cm		80 cm	85 cm	90 cm	95 cm	100 cm	105 cm	110 cm	115 cm																																																																																																		
	IN	24 in	26 in	28 in	30 in	32 in	34 in	36 in	38 in	40 in	42 in	44 in	46 in																																																																																																			
Размер Чашки	AA																																																																																																															
	A																																																																																																															
	B		XS		S		M		L		XL		2XL																																																																																																			
	C																																																																																																															
	D																																																																																																															
	E																																																																																																															

Бюстгальтер послеоперационный Celia	5006	Для послеоперационного использования после операции на молочной железе или общехирургических операций, когда восстанавливается полная подвижность. Также подходит для лучевой терапии, так как бюстгальтер не содержит металлических деталей.	Основное назначение Celia – защищать и поддерживать грудь, обеспечивать оптимальный комфорт пользователя. Celia-единственный бюстгальтер в линейке послеоперационных бюстгальтеров Carefix, который не содержит никаких зон компрессии и поддержки, однако благодаря плетению и материалу в сочетании с растяжением в 4 стороны, бюстгальтер обеспечивает легкую фиксацию	Белый	<table><tr><td>Обхват под грудью</td><td>CM</td><td>65 cm</td><td>70 cm</td><td>75 cm</td><td>80 cm</td><td>85 cm</td><td>90 cm</td><td>95 cm</td><td>100 cm</td><td>105 cm</td><td>110 cm</td></tr><tr><td></td><td>IN</td><td>26 in</td><td>28 in</td><td>30 in</td><td>32 in</td><td>34 in</td><td>36 in</td><td>38 in</td><td>40 in</td><td>42 in</td><td>44 in</td></tr><tr><td rowspan="6">Размер Чашки</td><td>AA</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>A</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>B</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>C</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>D</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>E</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Обхват под грудью	CM	65 cm	70 cm	75 cm	80 cm	85 cm	90 cm	95 cm	100 cm	105 cm	110 cm		IN	26 in	28 in	30 in	32 in	34 in	36 in	38 in	40 in	42 in	44 in	Размер Чашки	AA											A											B											C											D											E											Бюстгальтер не оснащен застежками
Обхват под грудью	CM	65 cm	70 cm	75 cm	80 cm	85 cm	90 cm	95 cm	100 cm	105 cm	110 cm																																																																																						
	IN	26 in	28 in	30 in	32 in	34 in	36 in	38 in	40 in	42 in	44 in																																																																																						
Размер Чашки	AA																																																																																																
	A																																																																																																
	B																																																																																																
	C																																																																																																
	D																																																																																																
	E																																																																																																
Бюстгальтер послеоперационный Celia	5007	Для послеоперационного использования после операции на молочной железе или общехирургических операций, когда восстанавливается полная подвижность. Также подходит для лучевой терапии, так как бюстгальтер не содержит металлических деталей.	Основное назначение Celia – защищать и поддерживать грудь, обеспечивать оптимальный комфорт пользователя. Celia-единственный бюстгальтер в линейке послеоперационных бюстгальтеров Carefix, который не содержит никаких зон компрессии и поддержки, однако благодаря плетению и материалу в сочетании с растяжением в 4 стороны, бюстгальтер	Черный	<table><tr><td>Обхват под грудью</td><td>CM</td><td>65 cm</td><td>70 cm</td><td>75 cm</td><td>80 cm</td><td>85 cm</td><td>90 cm</td><td>95 cm</td><td>100 cm</td><td>105 cm</td><td>110 cm</td></tr><tr><td></td><td>IN</td><td>26 in</td><td>28 in</td><td>30 in</td><td>32 in</td><td>34 in</td><td>36 in</td><td>38 in</td><td>40 in</td><td>42 in</td><td>44 in</td></tr><tr><td rowspan="6">Размер Чашки</td><td>AA</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>A</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>B</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>C</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>D</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>E</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Обхват под грудью	CM	65 cm	70 cm	75 cm	80 cm	85 cm	90 cm	95 cm	100 cm	105 cm	110 cm		IN	26 in	28 in	30 in	32 in	34 in	36 in	38 in	40 in	42 in	44 in	Размер Чашки	AA											A											B											C											D											E											Бюстгальтер не оснащен застежками
Обхват под грудью	CM	65 cm	70 cm	75 cm	80 cm	85 cm	90 cm	95 cm	100 cm	105 cm	110 cm																																																																																						
	IN	26 in	28 in	30 in	32 in	34 in	36 in	38 in	40 in	42 in	44 in																																																																																						
Размер Чашки	AA																																																																																																
	A																																																																																																
	B																																																																																																
	C																																																																																																
	D																																																																																																
	E																																																																																																

			обеспечивает легкую фиксацию			
Вкладыш анатомически для бюстгалтера	8108	Для использования в комплекте с бюстгалтерами Mary, Marianna сразу после операции на молочной железе, например мастэктомии или лампэктомии.	Назначение вкладыша – компенсация формы и объема молочной железы после мастэктомии или лампэктомии	Белый	Один размер	Вкладыш состоит из формы и наполнителя, который можно извлекать

5.2 Принцип действия

5.2.1 Различные зоны плетения

Заживление ран является критическим этапом восстановления после операции на молочной железе, однако существует много проблем, связанных с фиксацией повязок, а также проблем с опухшими, чувствительными тканями и общим дискомфортом.

Интегрированные зоны поддержки и компрессии (Tytex ZoneTech ®) в послеоперационных бюстгальтерах Tytex предназначены для снижения риска послеоперационных осложнений и дискомфорта, а также для поддержки области груди и рубцов во время периода заживления.

Каждый послеоперационный бюстгальтер Tytex имеет свои собственные совершенно уникальные зоны плетения для поддержки индивидуальных показаний. Чтобы проиллюстрировать различные структуры плетения в бюстгальтерах, используются различные цвета - см. рисунок ниже.



Цвета вместе с цифрами 1-6 указывают на гибкость и поддержку определенной зоны трикотажа:

- Чем меньше цифра, тем меньше жесткость в вязальной структуре, в результате чего в бюстгальтерах при необходимости образуются твердые и устойчивые зоны жесткого плетения
- Чем больше цифра, тем больше гибкости в вязальной структуре, что позволяет ткани обеспечить правильную поддержку и свободу движений при необходимости = зоны свободного плетения для поддержки и гибкости

Между зонами жёсткого плетения и зонами свободного плетения помещаются так называемые переходные зоны плетения. Они являются неотъемлемой частью каждого из бюстгальтеров для повышения комфорта и создания плавного профиля изделия. Иллюстрации и используемая технология зон плетения называются Tytex ZoneTech ®. Различные зоны

плетения также называются зонами сжатия и поддержки:

Таблица 3. Зоны сжатия /поддержки

Цвет/зона	Уровень	Назначение
Красная зона	1	Для разделения, фиксации и стабилизации
Зеленая зона	2	Для стабилизации, поднятия и поддержки
Синяя зона	3	Для поднятия, поддержки и придания формы
Оранжевая зона	4	Для придания формы и удержания
Фиолетовая зона	5	Для удержания и перемещения
Белая зона	6	Для перемещения и гибкости


5.2.2 Уровни компрессии

По ГОСТ Р 58236-2020 для определения класса компрессии применяют прибор измерительный на основе пневмодатчиков и модель твердотельную части тела человека (нога, рука, туловище, голова). Т.к. бюстгалтеры послеоперационные предназначены для ношения на груди, определить класс компрессии по методике ГОСТ Р 58236-2020 невозможно.

5.2.3 Уникальные технологии Tytex

Дифференцированные и целевые уровни как компрессии, так и поддержки сводят к минимуму накопление крови и жидкости, уменьшают отек и облегчают послеоперационную боль, тем самым способствуя процессу заживления, а также послеоперационному комфорту. Сочетание четырех уникальных технологий гарантирует, что каждый из бюстгалтеров отвечает как медицинским требованиям, так и требованиям конечного потребителя послеоперационного бюстгалтера.

Целевая поддержка/фиксация 	Каждый отдельный бюстгальтер разработан с интегрированными и специально предназначенными зонами поддержки (Tytex ZoneTech®). Зоны состоят из различных зон плетения, варьирующихся от свободных до жестких. Расположение зон основано на назначении, а также предпочтениях хирурга или медсестры. Каждая индивидуальная зона размещена так, чтобы нацелить и приспособить медицинские характеристики для достижения наилучшего хирургического результата и наиболее комфортного восстановления. Путем дифференциации зон поддержки, процесс заживления ускоряется и комфорт пациента увеличивается по мере того, как поддержка на участок становится целевой.
Растяжение в 4 стороны 	Растяжение в 4 стороны означает, что ткань в бюстгальтере будет естественным образом трансформироваться вместе с изменением контуров тела пациента после операции. Поскольку отекание и уменьшение отека являются естественной реакцией организма на хирургическое вмешательство, эта особенность изделия является неоценимой, так как позволяет нашим бюстгальтерам работать с телом пациента, обеспечивая идеальную посадку на протяжении всего восстановительного периода. Это также является большим преимуществом в случае операции на одной груди, так как бюстгальтер будет адаптироваться как к оперированной, так и к здоровой груди. Причина в том, что растяжение в 4 стороны обеспечивает сильные возможности растяжения и сжатия, что позволяет ткани оставаться в контакте с кожей в любое время во время восстановления. Растяжение в 4 стороны также позволяет компенсировать возможные натуральные различия в размерах и формах груди каждой женщины. Эта функция чрезвычайно важна в медицинском текстиле, так как она гарантирует, что благодаря постоянному контакту ткани с кожей продукт будет обеспечивать компрессию и поддержку, необходимые для восстановления, а также максимальный комфорт в любое время.

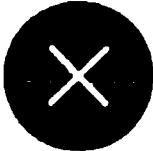Бесшовная вязка 	Для оптимального заживления место операции нуждается в восстановлении. Именно поэтому наши изделия не имеют швов в области раны/рубца или в любых других критических местах операционной области. Наши бюстгальтеры действительно бесшовные. Например, наши послеоперационные бюстгальтеры Carefix не имеют швов в чашках, по сторонам, на задней стороне и на ленте под грудью. Это обеспечивает максимальный комфорта для кожи и предотвращает давление, также как и общее раздражение кожи, ран и тканей. Другими словами: 100% бесшовная вязка означает более быстрое заживление ран, меньшее образование шрамов и более высокий комфорт пациентов.
Фактический размер 	Наша концепция размеров основана на статистических и проверенных измерениях тела (известных как знания о теле) и тесно связана с нашим материалом, растягивающимся в 4 стороны. Растяжение в 4 стороны и концепция размеров позволяет одному бюстгальтеру подходить для нескольких размеров, что невозможно с бюстгальтерами, изготовленными из более грубых (нерастяжимых) материалов. Дополнительно, наша концепция размеров приводит к меньшему количеству единиц складского учета.

Сочетание перечисленных выше технологий и особенностей послеоперационного белья Tytex обеспечивает продукцию качеством медицинского текстиля и выполнение заявленного назначения каждого варианта исполнения.

6. Классификация

Класс потенциального риска применения медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий: 1.

Вид медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий: 18120.

Код ОКПД 2: 32.50.22.126.

6. Показания, противопоказания к применению, возможные побочные эффекты применения медицинского изделия

Показания к применению:

Медицинское изделие предназначено для проведения компрессионной терапии в послеоперационный период, нормализации и улучшения мышечного тонуса, для

профилактики травматизма, поддержания мягких тканей в послеоперационный период и по жизненным показателям.

Используется для восстановления и профилактики нарушения физиологических функций организма человека в случаях:

- послеоперационного восстановления после общехирургических, пластических (эстетических и реконструктивных) вмешательств в области груди;

Противопоказания:

1. Использование медицинского изделия противопоказано для применения при местных инфекционных процессах, а также при наличии признаков хронической артериальной недостаточности.

2. Проявление побочных эффектов вследствие индивидуальных особенностей пациента, делающих применение изделия нецелесообразным, установленных его лечащим врачом, хирургом или медицинским учреждением, где проходила операция, связанных с конкретной ситуацией восстановления пациента после медицинского хирургического вмешательства.

Побочные эффекты:

Возможна индивидуальная аллергическая реакция на материалы медицинского изделия. Tutex минимизирует этот риск используя гипоаллергенные материалы, без латекса и формальдегида.

Раздражение кожи и следы на коже могут быть вызваны тканью, «молнией» или швом в период длительного ношения изделия. Tutex использует технологию бесшовной вязки для минимизации риска раздражения кожи и оставления на ней отпечатков при длительном ношении.

Раздражение раны может быть вызвано при использовании перевязочных средств или биндажей сразу же после операции. Tutex минимизирует этот риск, не используя швов в основных местах хирургического вмешательства.

Несоответствие варианта исполнения или размера медицинского изделия случаю применения может вызвать острые негативные ощущения. В этом случае необходимо проконсультироваться с хирургом или лечащим врачом. Следует отметить, что Tutex представляет широкую линейку изделий различных конструкций и форм, что позволяет минимизировать риски возникновения описанной ситуации несоответствия послеоперационной одежды. Большое число вариантов исполнения медицинского изделия позволяет подобрать компрессионное белье для пациента практически любого телосложения.

Меры предосторожности:

При использовании следует в первую очередь ориентироваться на комфорт пациента – в случае проявления негативных ощущений, следует отрегулировать натяжение лямок, в случае, если негативные ощущения сохраняются – обратиться к специалисту медицинского учреждения или хирургу за консультацией. При наличии острых негативных ощущений компрессионное белье запрещено носить длительное время, так как это может

отрицательно сказаться на состоянии здоровья пациента и ухудшить процесс восстановления и заживления раны.

Неисправность (непригодность для применения) медицинского изделия определяется по внешним признакам: растягивание и нарушение целостности компрессионного белья. В случае неисправности медицинского изделия рекомендуется прекратить использование и утилизировать его, приобрести новое.

7. Информация об условиях применения и потенциальных потребителях медицинского изделия

Медицинское изделие предназначено для применения в лечебно-профилактических учреждениях квалифицированным персоналом со средним и высшим медицинским образованием, а также пациентами в домашних условиях, при условии строгого соблюдения рекомендаций врача и инструкции по применению.

8. Технические характеристики


8.1 Технические характеристики вариантов исполнения медицинского изделия

Технические характеристики вариантов исполнения приведены в Приложении А.

9. Подбор варианта исполнения и размера изделия, инструкция по надеванию изделия

В каждую упаковку вкладывается краткая инструкция для потребителя. Ниже приведены макеты краткой инструкции для потребителя (в краткой инструкции, поставляемой с изделием, может незначительно отличаться расположение информационных элементов). В инструкциях подробно описан процесс подбора размера изделия, инструкция по надеванию изделия. Для определения подходящего вам размера проведите измерения и сравните со значениями, приведенными в таблицах. Измерения проводите при помощи портновской сантиметровой ленты, в спокойном состоянии тела, дважды. Портновская лента должна охватывать ваше тело, не впиваясь в кожу и не провисая над ней. При получении результатов измерения между размерами стоит отдать предпочтение большему размеру.

P2527.03-12-2020

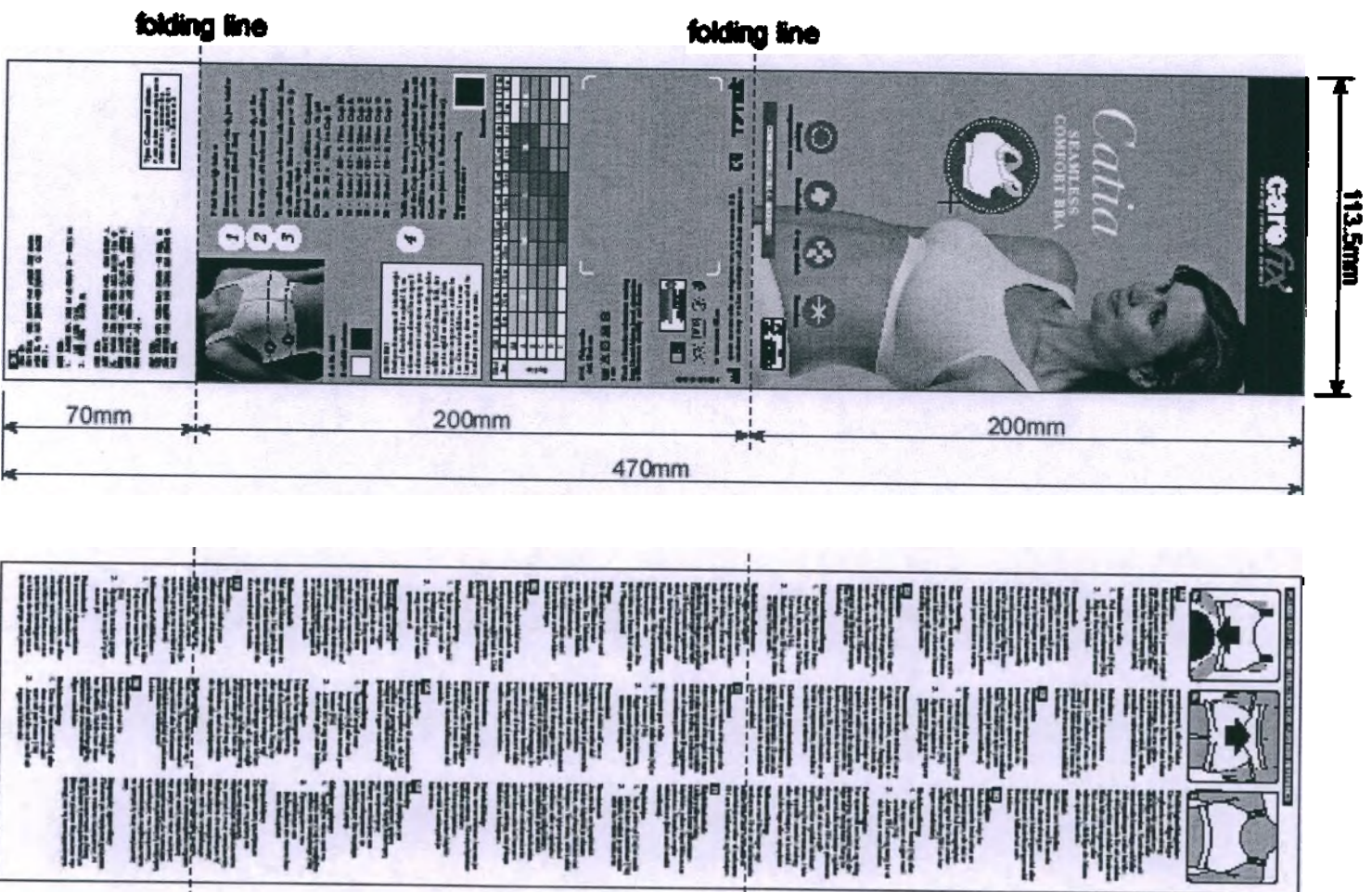

Перевод краткой инструкции для потребителя:

carefix[®]

Создающий функциональный комфорт

Catia

Бесшовный послеоперационный
бюстгальтер



Зоны поддержки/компрессии



Дышащее





Тянется в 4 стороны



Бесшовное

Полностью растягивающееся

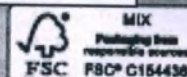

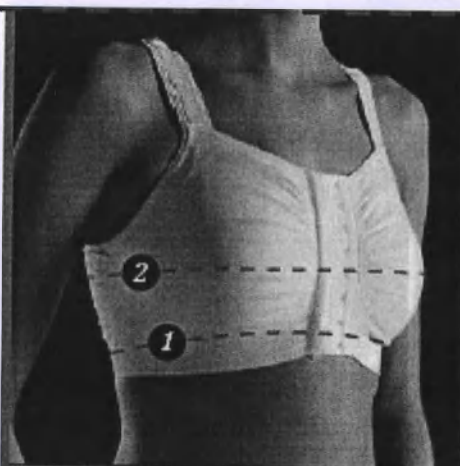

1
2
3

Подберите нужный размер

Измерьте обхват непосредственно под грудью (обхват под грудью)

Измерьте обхват груди по самым выступающим точкам (обхват груди)

Разница между обхватом под грудью и обхватом груди является Размером Чашки, например:
(Обхват груди - Обхват под грудью = Размер Чашки)

См 95-80=15 см, т.е. Чашка В

10-12 см = Чашка АА

12-14 см = чашка А

14-16 см = чашка В


16-18 см = чашка С

18-20 см = чашка Д

20-22 см = чашка Е

Артикул 3086

Доступные цвета:

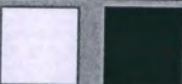

ВАЖНО

Всегда измеряйте себя, чтобы определить правильный размер бюстгальтера. Для оптимальной посадки, мы рекомендуем измерять после операции и. Если измерение производится до операции, возможно понадобится бюстгальтер больше на 1-2 размера, указанных в таблице Кейрфикс, из-за послеоперационного отека. Обратитесь за консультацией к своему хирургу, медсестре или дилеру для правильной идентификации размера. Для более сильной компрессии выберите бюстгальтер на размер меньше, для меньшей компрессии - на размер больше.

4

Чтобы определить размер бюстгальтера, воспользуйтесь Обхватом под грудью и Размером чашки. Если ваш Обхват под грудью 80 см и Размер чашки В, воспользуйтесь размерной таблицей Кейрфикс чтобы найти подходящий размер (размер L в таблице ниже)

Метод измерения в соответствии с EN 13402-3:2017



См. видео:

Обхват под грудью	CM	60 cm	65 cm	70 cm	75 cm	80 cm	85 cm	90 cm	95 cm	100 cm	105 cm	110 cm
	IN	24 in	26 in	28 in	30 in	32 in	34 in	36 in	38 in	40 in	42 in	44 in
Размер Чашки	AA											
	A		S			M		L		XL		
	B										2XL	
	C											
	D											
	E											

91% полиамид
9% эластан



Стирать с бельем похожего цвета в стиральном мешке. Использование отбеливателя на основе хлора или дезинфекция на основе хлора уменьшает долговечность и функциональность.



P2 527 03-12-20 20


www.carefix.eu

Tytex A/S сертифицирован в соответствии с ISO 9001, ISO 14001 и ISO 13485
Сделано в Словакии компанией: Tytex A/S Industrievj 21 * DK-7430 Ikast * www.tytex.com



TYTEX

Пожалуйста, сохраните эту инструкцию для дальнейшего применения

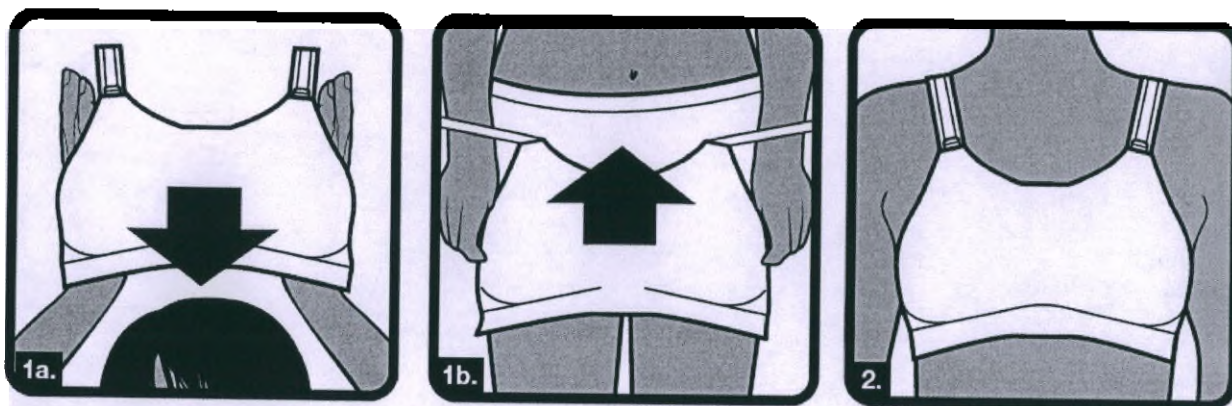

Назначение:

Медицинское изделие для послеоперационного использования после операции на молочной железе, когда восстанавливается полная подвижность. Также подходит для лучевой терапии (бюстгальтер не содержит металлических деталей).

Инструкция по применению:

1. Натяните через голову (1a) или натяните снизу вверх, как нижнее белье (1b).
2. Отрегулируйте бюстгальтер и убедитесь, что отсутствуют складки

Меры предосторожности:

Если у вас есть вопросы по использованию и правильному надеванию, пожалуйста, проконсультируйтесь с вашим врачом или медсестрой. Убедитесь, что бандажи и / или дренажные трубки под бюстгальтером размещены правильно, чтобы избежать давления и / или препятствовать протеканию дренажных трубок. Если возникнет неожиданный дискомфорт или раздражение, проконсультируйтесь с вашим врачом или медсестрой.

Уход:

Стирать с бельем похожего цвета в стиральном мешке. Использование отбеливателя на основе хлора или дезинфекция на основе хлора уменьшает долговечность и функциональность.

Артикул 3211

carefix®
Создающий функциональный комфорт


Bianca

Бесшовный послеоперационный бюстгальтер



Зоны поддержки/компрессии Дышащее Тянется в 4 стороны Бесшовное Полностью растягивающееся

МДХ
Переработано из
переработанного материала
FSC® C154436

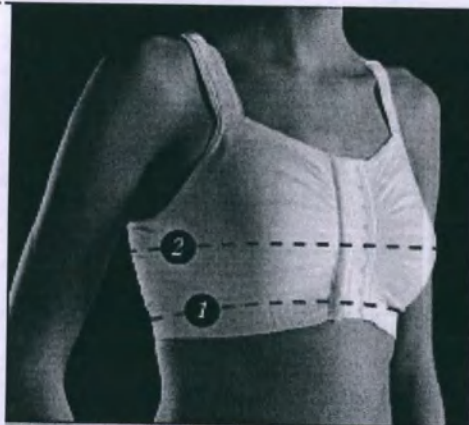

Артикул 3211
Доступные цвета:



ВАЖНО
Всегда измеряйте себя, чтобы определить правильный размер бюстгальтера. Для оптимальной посадки, мы рекомендуем измерять после операции и. Если измерение производится до операции, возможно понадобится бюстгальтер больше на 1-2 размера, указанных в таблице Кейрфикс, из-за послеоперационного отека. Обратитесь за консультацией к своему хирургу, медсестре или дилеру для правильной идентификации размера. Для более сильной компрессии выберите бюстгальтер на размер меньше, для меньшей компрессии - на размер больше.

1

Подберите нужный размер

Измерьте обхват непосредственно под грудью (обхват под грудью)

2

Измерьте обхват груди по самым выступающим точкам (обхват груди)

3

Разница между обхватом под грудью и обхватом груди является Размером Чашки, например:

(Обхват груди - Обхват под грудью = Размер Чашки)

См 95-80=15 см, т.е. Чашка В

10-12 см = Чашка АА

12-14 см = чашка А

14-16 см = чашка В

16-18 см = чашка С

18-20 см = чашка Д

20-22 см = чашка Е

4

Чтобы определить размер бюстгальтера, воспользуйтесь Обхватом под грудью и Размером чашки. Если ваш Обхват под грудью 80 см и Размер чашки В, воспользуйтесь размерной таблицей Кейрфикс чтобы найти подходящий размер (размер L в таблице ниже)


Метод измерения в соответствии с EN 13402-3:2017

См. видео:




Обхват под грудью	CM	65 cm	70 cm	75 cm	80 cm	85 cm	90 cm	95 cm	100 cm	105 cm	110 cm	115 cm	120 cm	125 cm
	IN	26 in	28 in	30 in	32 in	34 in	36 in	38 in	40 in	42 in	44 in	46 in	48 in	50 in
Размер Чашки	AA													
	A													
	B													
	C													
	D													
	E													

77% хлопок
13% полиамид
9% эластан

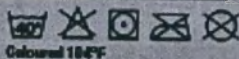

Coloured 150°C

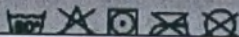

Перед стиркой застегните липучку. Стирать с бельем похожего цвета в стиральном мешке. Использование отбеливателя на основе хлора или дезинфекция на основе хлора уменьшает долговечность и функциональность.



P2528.02-03-2020

www.carefix.eu

Tytex A/S сертифицирован в соответствии с ISO 9001, ISO 14001 и ISO 13485
Сделано в Словакии компанией: Tytex A/S Industrivej 21 • DK-7430 Ikast •
www.tytex.com



TYTEX

Пожалуйста, сохраните эту инструкцию для дальнейшего применения



Назначение:

Медицинское изделие для послеоперационного использования после операций на груди и/или во время лучевой терапии.

Инструкция по применению:

Бюстгальтер застегивается спереди на липучку, что позволяет легко применять и регулировать его в операционной и/или во время восстановления. Передняя застежка также обеспечивает легкий осмотр раны. Плотно надавите на липучку, чтобы застегнуть.

Меры предосторожности:

Если у вас есть вопросы по использованию и правильному надеванию, пожалуйста, проконсультируйтесь с вашим врачом или медсестрой. Убедитесь, что бандажи и / или дренажные трубки под бюстгальтером размещены правильно, чтобы избежать давления и / или препятствовать протеканию дренажных трубок. Если возникнет неожиданный дискомфорт или раздражение, проконсультируйтесь с вашим врачом или медсестрой.


Уход:

Перед стиркой застегните молнию. Стирать с бельем похожего цвета в стиральном мешке. Использование отбеливателя на основе хлора или дезинфекция на основе хлора уменьшает долговечность и функциональность.

Артикул 3212:

■ Cyan ■ Magenta ■ Yellow ■ Black

113.5 mm

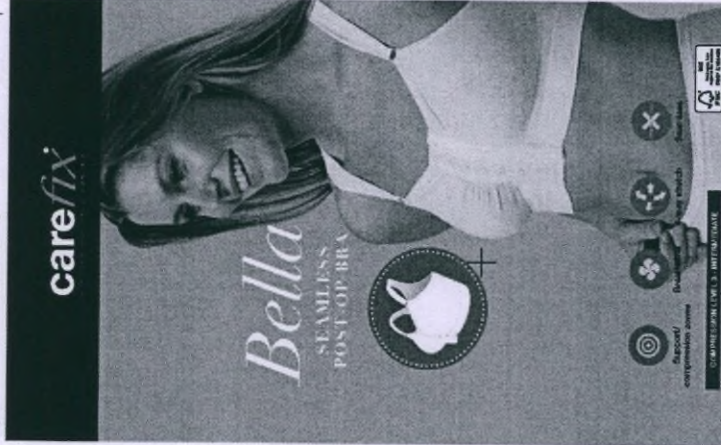

CE T/TEX

470 mm

100% Polyester

90% Polyester
10% Elastane

100% Polyester
10% Elastane

100% Polyester
10% Elastane

100% Polyester
10% Elastane

100% Polyester
10% Elastane

100% Polyester
10% Elastane

100% Polyester
10% Elastane

100% Polyester
10% Elastane

100	102	104	106	108	110	112	114	116	118	120	122	124	126	128	130	132	134	136	138	140	142	144	146	148	150	152	154	156	158	160	162	164	166	168	170	172	174	176	178	180	182	184	186	188	190	192	194	196	198	200	202	204	206	208	210	212	214	216	218	220	222	224	226	228	230	232	234	236	238	240	242	244	246	248	250	252	254	256	258	260	262	264	266	268	270	272	274	276	278	280	282	284	286	288	290	292	294	296	298	300	302	304	306	308	310	312	314	316	318	320	322	324	326	328	330	332	334	336	338	340	342	344	346	348	350	352	354	356	358	360	362	364	366	368	370	372	374	376	378	380	382	384	386	388	390	392	394	396	398	400	402	404	406	408	410	412	414	416	418	420	422	424	426	428	430	432	434	436	438	440	442	444	446	448	450	452	454	456	458	460	462	464	466	468	470	472	474	476	478	480	482	484	486	488	490	492	494	496	498	500	502	504	506	508	510	512	514	516	518	520	522	524	526	528	530	532	534	536	538	540	542	544	546	548	550	552	554	556	558	560	562	564	566	568	570	572	574	576	578	580	582	584	586	588	590	592	594	596	598	600	602	604	606	608	610	612	614	616	618	620	622	624	626	628	630	632	634	636	638	640	642	644	646	648	650	652	654	656	658	660	662	664	666	668	670	672	674	676	678	680	682	684	686	688	690	692	694	696	698	700	702	704	706	708	710	712	714	716	718	720	722	724	726	728	730	732	734	736	738	740	742	744	746	748	750	752	754	756	758	760	762	764	766	768	770	772	774	776	778	780	782	784	786	788	790	792	794	796	798	800	802	804	806	808	810	812	814	816	818	820	822	824	826	828	830	832	834	836	838	840	842	844	846	848	850	852	854	856	858	860	862	864	866	868	870	872	874	876	878	880	882	884	886	888	890	892	894	896	898	900	902	904	906	908	910	912	914	916	918	920	922	924	926	928	930	932	934	936	938	940	942	944	946	948	950	952	954	956	958	960	962	964	966	968	970	972	974	976	978	980	982	984	986	988	990	992	994	996	998	1000
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------

100% Polyester
10% Elastane

100% Polyester
10% Elastane

100% Polyester
10% Elastane

100% Polyester
10% Elastane

100% Polyester
10% Elastane

100% Polyester
10% Elastane

100% Polyester
10% Elastane

90% Polyester
10% Elastane

100% Polyester

100% Polyester
10% Elastane

100% Polyester
10% Elastane

100% Polyester
10% Elastane

100% Polyester
10% Elastane

100% Polyester
10% Elastane

100% Polyester
10% Elastane

100% Polyester
10% Elastane

90% Polyester
10% Elastane

100% Polyester

100% Polyester
10% Elastane

100% Polyester
10% Elastane

100% Polyester
10% Elastane

100% Polyester
10% Elastane

100% Polyester
10% Elastane

100% Polyester
10% Elastane

100% Polyester
10% Elastane

90% Polyester
10% Elastane

100% Polyester

100% Polyester
10% Elastane

100% Polyester
10% Elastane

100% Polyester
10% Elastane

100% Polyester
10% Elastane

100% Polyester
10% Elastane

100% Polyester
10% Elastane

100% Polyester
10% Elastane

90% Polyester
10% Elastane

100% Polyester

100% Polyester
10% Elastane

100% Polyester
10% Elastane

100% Polyester
10% Elastane

100% Polyester
10% Elastane

100% Polyester
10% Elastane

100% Polyester
10% Elastane

100% Polyester
10% Elastane

90% Polyester
10% Elastane

100% Polyester

Перевод краткой инструкции для потребителя:

carefix®
Создающий функциональный комфорт

Bella


Бесшовный послеоперационный бюстгальтер



Зоны поддержки/компрессии Дышащее Тянется в 4 стороны Бесшовное Полностью расстегивающееся

Полностью расстегивающееся

FSC C154436

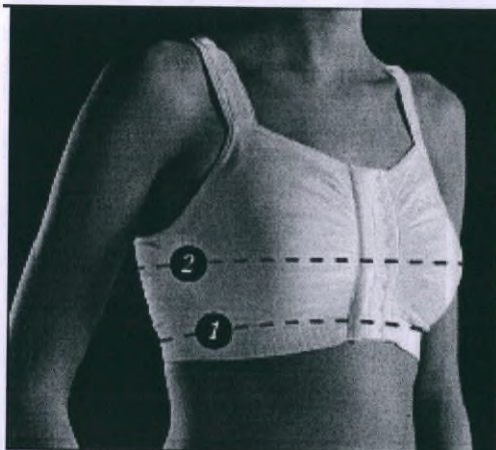

Артикул 3212
Доступные цвета:



ВАЖНО
Всегда измеряйте себя, чтобы определить правильный размер бюстгальтера. Для оптимальной посадки, мы рекомендуем измерять после операции и. Если измерение производится до операции, возможно понадобится бюстгальтер больше на 1-2 размера, указанных в таблице Кейрфикс, из-за послеоперационного отека. Обратитесь за консультацией к своему хирургу, медсестре или дилеру для правильной идентификации размера. Для более сильной компрессии выберите бюстгальтер на размер меньше, для меньшей компрессии - на размер больше.

1

2

3

Подберите нужный размер

Измерьте обхват непосредственно под грудью (обхват под грудью)

Измерьте обхват груди по самым выступающим точкам (обхват груди)

Разница между обхватом под грудью и обхватом груди является Размером Чашки, например:
(Обхват груди - Обхват под грудью = Размер Чашки)

См 95-80=15 см, т.е. Чашка В

10-12 см = Чашка АА

12-14 см = чашка А

14-16 см = чашка В

16-18 см = чашка С

18-20 см = чашка Д

20-22 см = чашка Е

Чтобы определить размер бюстгальтера, воспользуйтесь Обхватом под грудью и Размером чашки. Если ваш Обхват под грудью 80 см и Размер чашки В, воспользуйтесь размерной таблицей Кейрфикс чтобы найти подходящий размер (размер М в таблице ниже)

4


Метод измерения в соответствии с EN 13402-3:2017

См. видео:



Обхват под грудью	CM	60 cm	65 cm	70 cm	75 cm	80 cm	85 cm	90 cm	95 cm	100 cm	105 cm	110 cm	115 cm
	IN	24 in	26 in	28 in	30 in	32 in	34 in	36 in	38 in	40 in	42 in	44 in	46 in
Размер Чашки	AA												
	A												
	B		XS		S		M		L		XL		2XL
	C												
	D												
	E												

91% полиамид
9% эластан

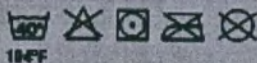

Перед стиркой застегните крючки. Стирать с бельем похожего цвета в стиральном мешке. Использование отбеливателя на основе хлора или дезинфекция на основе хлора уменьшает долговечность и функциональность.



P232502-03-2020


www.carefix.eu

Tytex A/S сертифицирован в соответствии с ISO 9001, ISO 14001 и ISO 13485
Сделано в Словакии компанией: Tytex A/S Industrvej 21 • DK-7430 Ikast •
www.tytex.com



TYTEX

Пожалуйста, сохраните эту инструкцию для дальнейшего применения

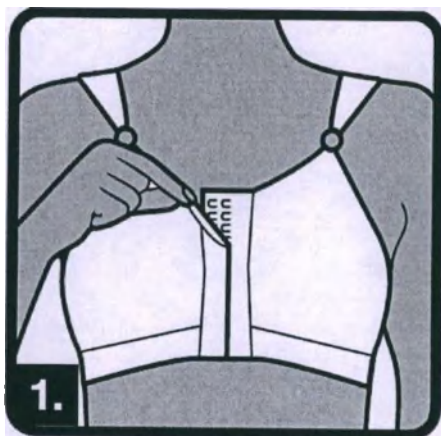

Назначение:

Медицинское изделие для послеоперационного использования после операций на груди.

Инструкция по применению:

Бюстгальтер застегивается спереди на липучку, что позволяет легко носить и регулировать его в операционной и/или во время восстановления. Передняя застежка также обеспечивает легкий осмотр раны. Плотно застегивайте на липучку, чтобы закрыть.

Меры предосторожности:

Если у вас есть вопросы по использованию и правильному надеванию, пожалуйста, проконсультируйтесь с вашим врачом или медсестрой. Убедитесь, что бандажи и / или дренажные трубки под бюстгальтером размещены правильно, чтобы избежать давления и / или препятствовать протеканию дренажных трубок. Если возникнет неожиданный дискомфорт или раздражение, проконсультируйтесь с вашим врачом или медсестрой.

Уход:

Перед стиркой застегните липучку. Стирать с бельем похожего цвета в стиральном мешке. Использование отбеливателя на основе хлора или дезинфекция на основе хлора уменьшает долговечность и функциональность.

Перевод краткой инструкции для потребителя:


carefix®
Создающий функциональный комфорт

Anna

Бесшовный послеоперационный бюстгальтер



Зоны поддержки/компрессии Дышащее Тянется в 4 стороны Бесшовное Полностью растягивающееся

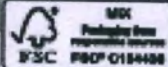



1

2

3

4

Артикул 3270
Доступные цвета:



ВАЖНО

Всегда измеряйте себя, чтобы определить правильный размер бюстгальтера. Для оптимальной посадки, мы рекомендуем измерять после операции и. Если измерение производится до операции, возможно понадобится бюстгальтер больше на 1-2 размера, указанных в таблице Кейрфикс, из-за послеоперационного отека. Обратитесь за консультацией к своему хирургу, медсестре или дилеру для правильной идентификации размера. Для более сильной компрессии выберите бюстгальтер на размер меньше, для меньшей компрессии - на размер больше.

Find the right size

Подберите нужный размер

Измерьте обхват непосредственно под грудью (обхват под грудью)

Измерьте обхват груди по самым выступающим точкам (обхват груди)

Разница между обхватом под грудью и обхватом груди является Размером Чашки, например: (Обхват груди - Обхват под грудью = Размер Чашки)

См 95-80=15 см, т.е. Чашка В

10-12 см = Чашка АА

12-14 см = чашка А

14-16 см = чашка В

16-18 см = чашка С

18-20 см = чашка Д

20-22 см = чашка Е

Чтобы определить размер бюстгальтера, воспользуйтесь Обхватом под грудью и Размером чашки. Если ваш Обхват под грудью 80 см и Размер чашки В, воспользуйтесь размерной таблицей Кейрфикс чтобы найти подходящий размер (размер М в таблице ниже)


Метод измерения в соответствии с EN 13402-3:2017

См. видео:



Обхват под грудью	CM	70 cm	75 cm	80 cm	85 cm	90 cm	95 cm	100 cm	105 cm	110 cm	115 cm
	IN	28 in	30 in	32 in	34 in	36 in	38 in	40 in	42 in	44 in	46 in
Размер Чашки	AA										
	A										
	B	S		M		L		XL		2XL	
	C										
	D										
	E										

91% полиамид
9% эластан

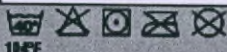

Перед стиркой застегните молнию. Стирать с бельем похожего цвета в стиральном мешке. Использование отбеливателя на основе хлора или дезинфекция на основе хлора уменьшает долговечность и функциональность.




P2821.03-03-2020

www.carefix.eu

Тутех A/S сертифицирован в соответствии с ISO 9001, ISO 14001 и ISO 13485
Сделано в Словакии компанией: Tytux A/S Industrivej 21 * DK-7430 Ikast •
www.tytex.com



Пожалуйста, сохраните эту инструкцию для дальнейшего применения

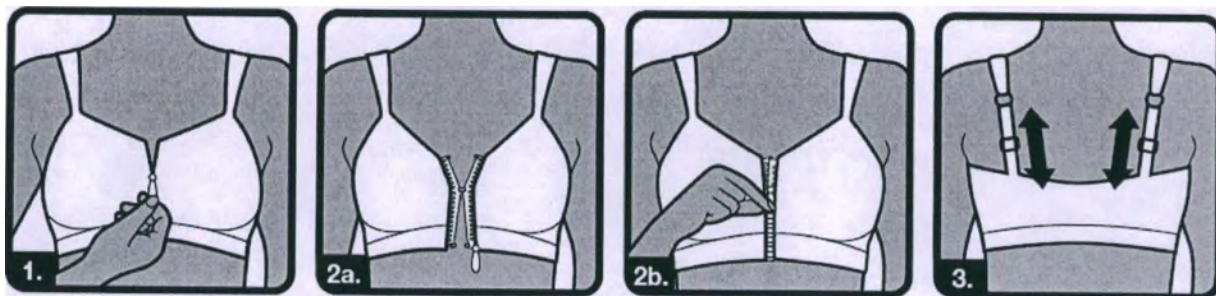

Назначение:

Медицинское изделие для послеоперационного использования после операций на груди.

Инструкция по применению:


1. Бюстгальтер застегивается спереди на молнию и 2 ряда крючков, что позволяет легко применять и регулировать его в операционной и/или во время восстановления. Застежка спереди также позволяет легко проводить осмотр раны.
2. Когда бюстгальтер будет надет, застегните крючки в случайном порядке (2a), а затем молнию (2b).
3. Отрегулируйте плечевые лямки так, чтобы бюстгальтер не раздражал кожу, но обеспечивал оптимальную поддержку груди и не было дискомфорта в подмышках.

Меры предосторожности:

Если у вас есть вопросы по использованию и правильному надеванию, пожалуйста, проконсультируйтесь с вашим врачом или медсестрой. Убедитесь, что бандажи и / или дренажные трубки под бюстгальтером размещены правильно, чтобы избежать давления и / или препятствовать протеканию дренажных трубок. При увеличении груди может потребоваться стабилизирующая повязка для грудных имплантов. Проконсультируйтесь с вашим врачом или хирург перед использованием. Всегда следуйте рекомендациям хирурга. Бюстгальтер необходимо снимать во время лучевой терапии, так как изделие содержит металлические детали. Если возникнет неожиданный дискомфорт или раздражение, проконсультируйтесь с вашим врачом или медсестрой.

Уход:

Перед стиркой застегните молнию. Стирать с бельем похожего цвета в стиральном мешке. Использование отбеливателя на основе хлора или дезинфекция на основе хлора уменьшает долговечность и функциональность.

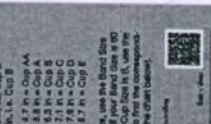

Alice
SEAMLESS
POST-OP BRA

 Target
 Walmart
 Kmart
 Sears
 J&J
 Sears
 Sears
 Sears
 Sears
 Sears
 Sears
 Sears
 Sears
 Sears
 Sears
 Sears
 Sears
 Sears
 Sears
 Sears
 Sears
 Sears
 Sears

 Target
 Walmart
 Kmart
 Sears
 J&J
 Sears
 Sears
 Sears
 Sears
 Sears
 Sears
 Sears
 Sears
 Sears
 Sears
 Sears
 Sears
 Sears
 Sears
 Sears
 Sears
 Sears
 Sears

 Target
 Walmart
 Kmart
 Sears
 J&J
 Sears
 Sears
 Sears
 Sears
 Sears
 Sears
 Sears
 Sears
 Sears
 Sears
 Sears
 Sears
 Sears
 Sears
 Sears
 Sears
 Sears
 Sears

 Target
 Walmart
 Kmart
 Sears
 J&J
 Sears
 Sears
 Sears
 Sears
 Sears
 Sears
 Sears
 Sears
 Sears
 Sears
 Sears
 Sears
 Sears
 Sears
 Sears
 Sears
 Sears
 Sears

 Target
 Walmart
 Kmart
 Sears
 J&J
 Sears
 Sears
 Sears
 Sears
 Sears
 Sears
 Sears
 Sears
 Sears
 Sears
 Sears
 Sears
 Sears
 Sears
 Sears
 Sears
 Sears
 Sears

 Target
 Walmart
 Kmart
 Sears
 J&J
 Sears
 Sears
 Sears
 Sears
 Sears
 Sears

1. How to wear a seat belt

1. Buckle up. Insert the tongue of the buckle into the slot on the buckle.

2. Pull the shoulder strap across your chest. The strap should be snug against your body.

3. Adjust the shoulder strap so that it is level across your shoulders.

4. Buckle the buckle. The buckle should be level with your waist.

5. Do not drink and drive. Do not use alcohol or drugs while driving.

6. Do not use your seat belt if you are pregnant or have a medical condition that prevents you from wearing a seat belt.

7. Do not use your seat belt if you are wearing a child safety seat or a booster seat.

8. Do not use your seat belt if you are wearing a motorcycle helmet.

9. Do not use your seat belt if you are wearing a hard hat.

10. Do not use your seat belt if you are wearing a life jacket.

2. How to use a child safety seat

1. Read the instructions. Read the instructions carefully before using the child safety seat.

2. Choose the right seat. Choose a child safety seat that is appropriate for your child's age, weight, and height.

3. Install the seat. Install the child safety seat in the vehicle according to the instructions.

4. Buckle the child. Buckle the child into the seat according to the instructions.

5. Check the seat. Check the seat regularly to make sure it is properly installed and used.

6. Do not use the seat if it is damaged. Do not use the child safety seat if it is damaged or if the instructions are not followed.

7. Do not use the seat if it is expired. Do not use the child safety seat if it is expired.

8. Do not use the seat if it is recalled. Do not use the child safety seat if it has been recalled.

9. Do not use the seat if it is not approved. Do not use the child safety seat if it is not approved by the National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA).

10. Do not use the seat if it is not used correctly. Do not use the child safety seat if it is not used correctly.

3. How to use a motorcycle helmet

1. Choose the right helmet. Choose a motorcycle helmet that is appropriate for your riding style and the type of motorcycle you are riding.

2. Adjust the helmet. Adjust the helmet so that it fits snugly on your head.

3. Buckle the chin strap. Buckle the chin strap of the helmet.

4. Check the helmet. Check the helmet regularly to make sure it is in good condition.

5. Do not use the helmet if it is damaged. Do not use the motorcycle helmet if it is damaged.

6. Do not use the helmet if it is expired. Do not use the motorcycle helmet if it is expired.

7. Do not use the helmet if it is recalled. Do not use the motorcycle helmet if it has been recalled.

8. Do not use the helmet if it is not approved. Do not use the motorcycle helmet if it is not approved by the Department of Transportation (DOT).

9. Do not use the helmet if it is not used correctly. Do not use the motorcycle helmet if it is not used correctly.

10. Do not use the helmet if it is not worn. Do not use the motorcycle helmet if it is not worn.

4. How to use a life jacket

1. Choose the right life jacket. Choose a life jacket that is appropriate for your weight and the type of water activity you are participating in.

2. Adjust the life jacket. Adjust the life jacket so that it fits snugly on your body.

3. Buckle the life jacket. Buckle the life jacket according to the instructions.

4. Check the life jacket. Check the life jacket regularly to make sure it is in good condition.

5. Do not use the life jacket if it is damaged. Do not use the life jacket if it is damaged.

6. Do not use the life jacket if it is expired. Do not use the life jacket if it is expired.

7. Do not use the life jacket if it is recalled. Do not use the life jacket if it has been recalled.

8. Do not use the life jacket if it is not approved. Do not use the life jacket if it is not approved by the U.S. Coast Guard.

9. Do not use the life jacket if it is not used correctly. Do not use the life jacket if it is not used correctly.

10. Do not use the life jacket if it is not worn. Do not use the life jacket if it is not worn.

5. How to use a fire extinguisher

1. Pull the pin. Pull the pin of the fire extinguisher.

2. Aim the nozzle. Aim the nozzle of the fire extinguisher at the base of the fire.

3. Squeeze the handle. Squeeze the handle of the fire extinguisher.

4. Sweep the nozzle. Sweep the nozzle of the fire extinguisher from side to side.

5. Do not use the fire extinguisher if it is damaged. Do not use the fire extinguisher if it is damaged.

6. Do not use the fire extinguisher if it is expired. Do not use the fire extinguisher if it is expired.

7. Do not use the fire extinguisher if it is recalled. Do not use the fire extinguisher if it has been recalled.

8. Do not use the fire extinguisher if it is not approved. Do not use the fire extinguisher if it is not approved by the U.S. Department of Agriculture (USDA).

9. Do not use the fire extinguisher if it is not used correctly. Do not use the fire extinguisher if it is not used correctly.

10. Do not use the fire extinguisher if it is not worn. Do not use the fire extinguisher if it is not worn.

6. How to use a first aid kit

1. Choose the right first aid kit. Choose a first aid kit that is appropriate for your needs.

2. Adjust the first aid kit. Adjust the first aid kit so that it is easy to use.

3. Use the first aid kit. Use the first aid kit according to the instructions.

4. Check the first aid kit. Check the first aid kit regularly to make sure it is in good condition.

5. Do not use the first aid kit if it is damaged. Do not use the first aid kit if it is damaged.

6. Do not use the first aid kit if it is expired. Do not use the first aid kit if it is expired.

7. Do not use the first aid kit if it is recalled. Do not use the first aid kit if it has been recalled.

8. Do not use the first aid kit if it is not approved. Do not use the first aid kit if it is not approved by the U.S. Food and Drug Administration (FDA).

9. Do not use the first aid kit if it is not used correctly. Do not use the first aid kit if it is not used correctly.

10. Do not use the first aid kit if it is not worn. Do not use the first aid kit if it is not worn.

Перевод краткой инструкции для потребителя:

carefix
Создающий функциональный комфорт

Alice


Бесшовный послеоперационный бюстгальтер



Зоны поддержки/компрессии Дышащее Тянется в 4 стороны Бесшовное Полностью расстегивающееся

Российская Федерация

FSC® P80P-C18443M

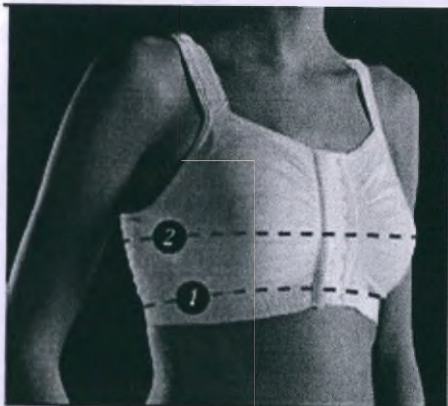

Артикул 3291
Доступные цвета:



ВАЖНО
Всегда измеряйте себя, чтобы определить правильный размер бюстгалтера. Для оптимальной посадки, мы рекомендуем измерять после операции и. Если измерение производится до операции, возможно понадобится бюстгалтер больше на 1-2 размера, указанных в таблице Кейрфикс, из-за послеоперационного отека. Обратитесь за консультацией к своему хирургу, медсестре или дилеру для правильной идентификации размера. Для более сильной компрессии выберите бюстгалтер на размер меньше, для меньшей компрессии - на размер больше.

1

Подберите нужный размер

Измерьте обхват непосредственно под грудью (обхват под грудью)

2

Измерьте обхват груди по самым выступающим точкам (обхват груди)

3

Разница между обхватом под грудью и обхватом груди является Размером Чашки, например:
(Обхват груди - Обхват под грудью = Размер Чашки)

См 95-80=15 см, т.е. Чашка В

10-12 см = Чашка АА

12-14 см = чашка А

14-16 см = чашка В

16-18 см = чашка С

18-20 см = чашка Д

20-22 см = чашка Е

Чтобы определить размер бюстгалтера, воспользуйтесь Обхватом под грудью и Размером чашки. Если ваш Обхват под грудью 80 см и Размер чашки В, воспользуйтесь размерной таблицей Кейрфикс чтобы найти подходящий размер (размер М в таблице ниже)

4

Метод измерения в соответствии с EN 13402-3:2017

См. видео:



Обхват под грудью	CM	70 cm	75 cm	80 cm	85 cm	90 cm	95 cm	100 cm	105 cm	110 cm	115 cm
	IN	28 in	30 in	32 in	34 in	36 in	38 in	40 in	42 in	44 in	46 in
Размер Чашки	AA										
	A										
	B	S		M		L		XL		2XL	
	C										
	D										
E											

91% полиамид
9% эластан



Перед стиркой застегните все крючки. Стирать с бельем похожего цвета в стиральном мешке. Использование отбеливателя на основе хлора или дезинфекция на основе хлора уменьшает долговечность и функциональность.

470 mm

P252602-03-2020



www.carefx.eu




Tytex A/S сертифицирован в соответствии с ISO 9001, ISO 14001 и ISO 13485
Сделано в Словакии компанией: Tytex A/S Industrvej 21 • DK-7430 Ikast •
www.tytex.com



TUTEX

Пожалуйста, сохраните эту инструкцию для дальнейшего применения

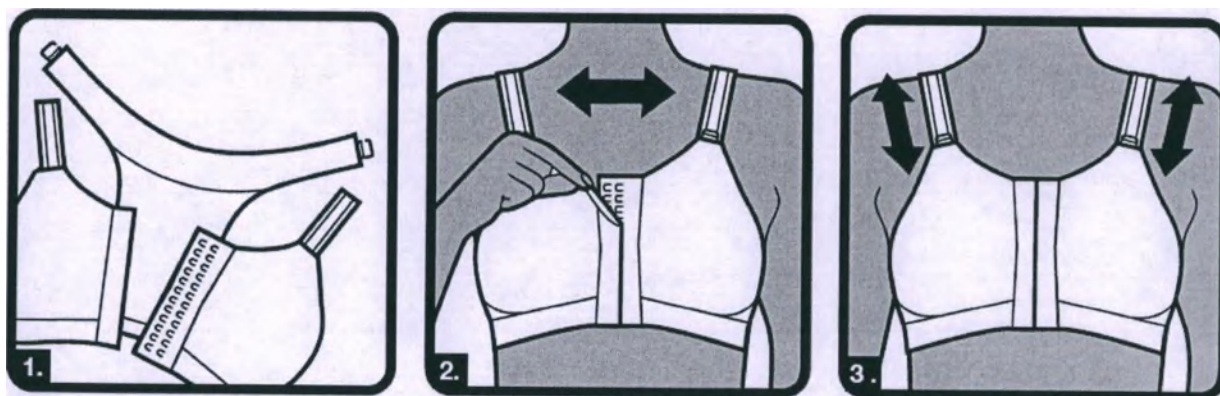

Назначение:

Медицинское изделие для послеоперационного использования после операций на груди. В основном подходит для груди маленького и среднего размера.

Инструкция по применению:

1. Бюстгальтер можно полностью раскрыть как на груди и на погонах, позволяет легко наносить и настраивать в операционной и / или во время выздоровления.
2. Регулируемая застежка спереди с 2 рядами с 6 крючками позволяет легко осмотреть рану и регулировать поддержку.
3. Отрегулируйте плечевые лямки так, чтобы бюстгальтер не раздражал кожу, но обеспечивал оптимальную поддержку груди и не было дискомфорта в подмышках.

Меры предосторожности:

Если у вас есть вопросы по использованию и правильному надеванию, пожалуйста, проконсультируйтесь с вашим врачом или медсестрой. Убедитесь, что бандажи и / или дренажные трубки под бюстгальтером размещены правильно, чтобы избежать давления и / или препятствовать протеканию дренажных трубок. При увеличении груди может потребоваться стабилизирующая повязка для грудных имплантов. Проконсультируйтесь с вашим врачом или хирург перед использованием. Всегда следуйте рекомендациям хирурга. Бюстгальтер необходимо снимать во время лучевой терапии, так как изделие содержит металлические детали. Если возникнет неожиданный дискомфорт или раздражение, проконсультируйтесь с вашим врачом или медсестрой.

Уход:

Перед стиркой застегните все крючки. Стирать с бельем похожего цвета в стиральном мешке. Использование отбеливателя на основе хлора или дезинфекция на основе хлора уменьшает долговечность и функциональность.

Перевод краткой инструкции для потребителя:

care

Создающий функциональный комфорт

Sophia

Бесшовный послеоперационный
бюстгальтер



Зоны поддержки/компрессии



Дышащее




Тянется в 4 стороны
расстегивающееся



Бесшовное




Полностью

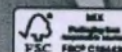



Артикул 3342
Доступные цвета:

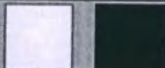

ВАЖНО

Всегда измеряйте себя, чтобы определить правильный размер бюстгалтера. Для оптимальной посадки, мы рекомендуем измерять после операции и. Если измерение производится до операции, возможно понадобится бюстгалтер больше на 1-2 размера, указанных в таблице Кейрфикс, из-за послеоперационного отека. Обратитесь за консультацией к своему хирургу, медсестре или дилеру для правильной идентификации размера. Для более сильной компрессии выберите бюстгалтер на размер меньше, для меньшей компрессии - на размер больше.

1

Подберите нужный размер

Измерьте обхват непосредственно под грудью (обхват под грудью)

2

Измерьте обхват груди по самым выступающим точкам (обхват груди)

3

Разница между обхватом под грудью и обхватом груди является Размером Чашки, например:
(Обхват груди - Обхват под грудью = Размер Чашки)

См 95-80=15 см, т.е. Чашка В

10-12 см = Чашка АА

12-14 см = чашка А

14-16 см = чашка В

16-18 см = чашка С

18-20 см = чашка Д

20-22 см = чашка Е

4


Чтобы определить размер бюстгалтера, воспользуйтесь Обхватом под грудью и Размером чашки. Если ваш Обхват под грудью 80 см и Размер чашки В, воспользуйтесь размерной таблицей Кейрфикс чтобы найти подходящий размер (размер L в таблице ниже)

См. видео:

Метод измерения в соответствии
с EN 13402-3:2017

Обхват под грудью	CM	60 cm	65 cm	70 cm	75 cm	80 cm	85 cm	90 cm	95 cm	100 cm	105 cm	110 cm	115 cm	120 cm
	IN	24 in	26 in	28 in	30 in	32 in	34 in	36 in	38 in	40 in	42 in	44 in	46 in	48 in
Размер Чашки	AA													
	A			\$		M		L		XL		2XL		3XL
	B													
	C													
	D													
	E													

78% хлопок
15% полиамид
7% эластан

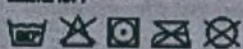

Wash 100°C

Перед стиркой застегните липучки и молнию.
Стирать с бельем похожего цвета в стиральном мешке. Использование отбеливателя на основе хлора или дезинфекция на основе хлора уменьшает долговечность и функциональность.



Tytext Customer Service:
E-mail: customerservice@tytext.com
International: +45 9650 4300; +49 2282 782914
Americas: +1-855-560-8131


www.carefix.eu

Tytext A/S сертифицирован в соответствии с ISO 9001, ISO 14001 и ISO 13485
Сделано в Словакии компанией: Tytext A/S Industrvej 21 • DK-7430 Ikast •
www.tytext.com



TY

Пожалуйста, сохраните эту инструкцию для дальнейшего применения

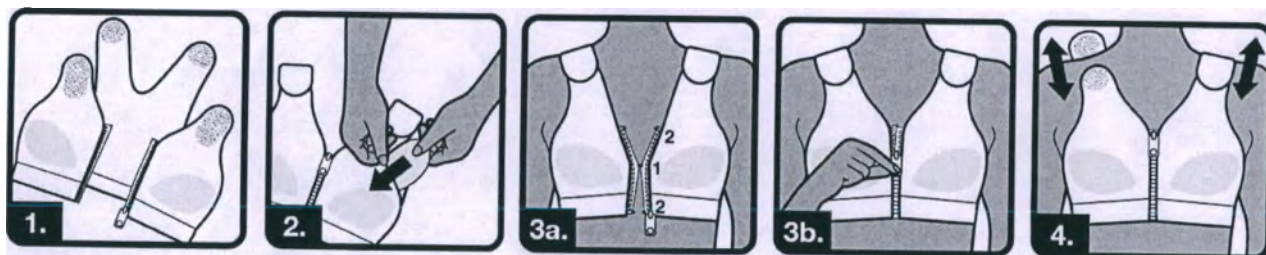

Назначение:

Медицинское изделие для послеоперационного использования после операции на молочной железе, особенно мастэктомии. С карманами для вкладыша для бюстгальтера.

Инструкция по применению:

1. Бюстгальтер может быть полностью открыт как спереди, так и на плечевых ремнях, что позволяет легко применять и регулировать его в операционной и/или во время восстановления. Переднее отверстие обеспечивает легкий осмотр раны.
2. При необходимости поместите вкладыши для бюстгальтера Carefix в карманы бюстгальтера до того, как он будет надет.
3. Когда бюстгальтер будет надет, сначала закройте крючок посередине, затем два других
4. крючка в случайном порядке (3a), а затем молнию (3b).
5. Отрегулируйте плечевые ремни с помощью липучки, чтобы бюстгальтер не раздражал кожу, но обеспечивает оптимальную поддержку и комфортное ощущение под мышками.

Меры предосторожности:

Если у вас есть вопросы по использованию и правильному надеванию, пожалуйста, проконсультируйтесь с вашим врачом или медсестрой. Убедитесь, что бандажи и / или дренажные трубки под бюстгальтером размещены правильно, чтобы избежать давления и / или препятствовать протеканию дренажных трубок. Если возникнет неожиданный дискомфорт или раздражение, проконсультируйтесь с вашим врачом или медсестрой.

Уход:

Перед стиркой застегните липучки и молнию. Стирать с бельем похожего цвета в стиральном мешке. Использование отбеливателя на основе хлора или дезинфекция на основе хлора уменьшает долговечность и функциональность.

Артикул 3343:

carefix
Создающий функциональный комфорт

Mary

Бесшовный послеоперационный бюстгальтер



Зоны поддержки/компрессии Дышащее Тянется в 4 стороны Бесшовное Полностью расстегивающееся

000 ЦРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

FSC MX Protecting from responsible sources FSC® C154438



Поступило



4

[illegible]

Oeko-Tex®
CERTIFICATE OF TEST RESULTS
STANDARD 100
6234-7001 DTI
Textile Institute
www.oeko-tex.com




P253204-01-2021

Тytex A/S сертифицирован в соответствии с ISO 9001, ISO 14001 и ISO 13485
Сделано в Словакии компанией: Tytex A/S Industrvej 21 * DK-7430 Ikast *
www.tytex.com

CE

ТУТЕЖ

Пожалуйста, сохраните эту инструкцию для дальнейшего применения

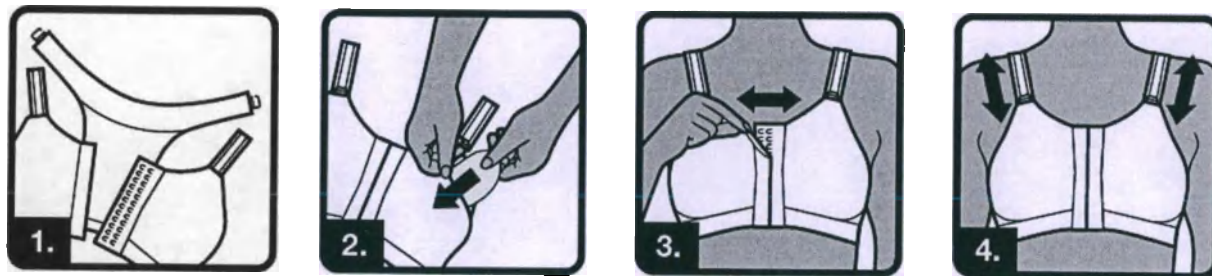

Назначение:

Медицинское изделие для послеоперационного использования после операции на молочной железе, особенно мастэктомии и лампэктомии. С карманами для вкладыша для бюстгальтера.

Инструкция по применению:

1. Бюстгальтер может быть полностью открыт как спереди, так и на плечевых ремнях, что позволяет легко применять и регулировать его в операционной и/или во время восстановления.
2. При необходимости поместите вкладыши для бюстгальтера Carefix в карманы бюстгальтера до того, как он будет надет.
3. Регулируемое переднее закрытие с 2 рядами по 8 крючков обеспечивает легкий осмотр раны и регулировку поддержки/компрессии.
4. Отрегулируйте плечевые ремни с помощью липучки, чтобы бюстгальтер не раздражал кожу, но обеспечивал оптимальную поддержку и комфортное ощущение под мышками.

Меры предосторожности:

Если у вас есть вопросы по использованию и правильному надеванию, пожалуйста, проконсультируйтесь с вашим врачом или медсестрой. Убедитесь, что бандажи и / или дренажные трубки под бюстгальтером размещены правильно, чтобы избежать давления и / или препятствовать протеканию дренажных трубок. Если возникнет неожиданный дискомфорт или раздражение, проконсультируйтесь с вашим врачом или медсестрой.

Уход:

Перед стиркой застегните крючки. Стирать с бельем похожего цвета в стиральном мешке. Использование отбеливателя на основе хлора или дезинфекция на основе хлора уменьшает долговечность и функциональность.

Перевод краткой инструкции для потребителя:

care

Создающий функциональный комфорт

Marianne

Бесшовный послеоперационный бюстгальтер



Зоны поддержки/компрессии
растегивающиеся


Дышащее

Тянется в 4 стороны

Бесшовное

Полностью



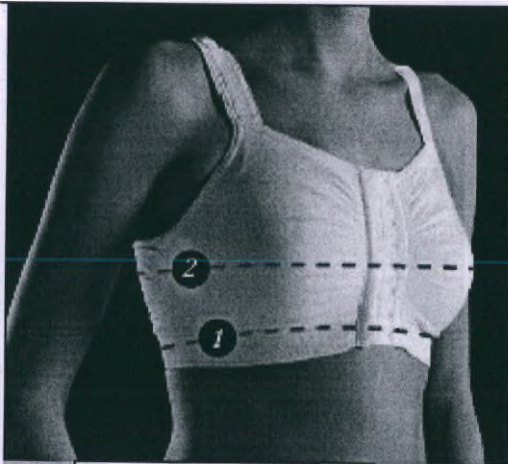

Артикул 3373
Доступные цвета:



ВАЖНО

Всегда измеряйте себя, чтобы определить правильный размер бюстгалтера. Для оптимальной посадки, мы рекомендуем измерять после операции и. Если измерение производится до операции, возможно понадобится бюстгалтер больше на 1-2 размера, указанных в таблице Кейрфикс, из-за послеоперационного отека. Обратитесь за консультацией к своему хирургу, медсестре или дилеру для правильной идентификации размера. Для более сильной компрессии выберите бюстгалтер на размер меньше, для меньшей компрессии - на размер больше.

1

Подберите нужный размер

Измерьте обхват непосредственно под грудью (обхват под грудью)

2

Измерьте обхват груди по самым выступающим точкам (обхват груди)

3

Разница между обхватом под грудью и обхватом груди является Размером Чашки, например: (Обхват груди - Обхват под грудью = Размер Чашки)

См 95-80=15 см, т.е. Чашка В

10-12 см = Чашка АА

12-14 см = чашка А

14-16 см = чашка В

16-18 см = чашка С

18-20 см = чашка Д

20-22 см = чашка Е

Чтобы определить размер бюстгалтера, воспользуйтесь Обхватом под грудью и Размером чашки. Если ваш Обхват под грудью 80 см и Размер чашки В, воспользуйтесь размерной таблицей Кейрфикс чтобы найти подходящий размер (размер М в таблице ниже)

4


Метод измерения в соответствии с EN 13402-3:2017

См. видео:



Обхват под грудью	CM	70 cm	75 cm	80 cm	85 cm	90 cm	95 cm	100 cm	105 cm	110 cm	115 cm
	IN	28 in	30 in	32 in	34 in	36 in	38 in	40 in	42 in	44 in	46 in
Размер Чашки	AA										
	A										
	B										
	C										
	D										
	E										

91% полиамид, 9% эластан

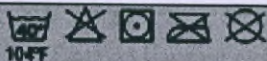

Застегните крючки перед стиркой. Стирать с бельем похожего цвета в стиральном мешке. Использование отбеливателя на основе хлора или дезинфекция на основе хлора уменьшает долговечность и функциональность.



OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
4094-7001 BT
Trusted for everyday applications
www.oeko-tex.com




www.carefix.eu

Тутех А/С сертифицирован в соответствии с ISO 9001, ISO 14001 и ISO 13485
Сделано в Словакии компанией: Tytux A/S Industrivej 21 * DK-7430 Ikast * www.tytex.com



TYTEX

Пожалуйста, сохраните эту инструкцию для дальнейшего применения

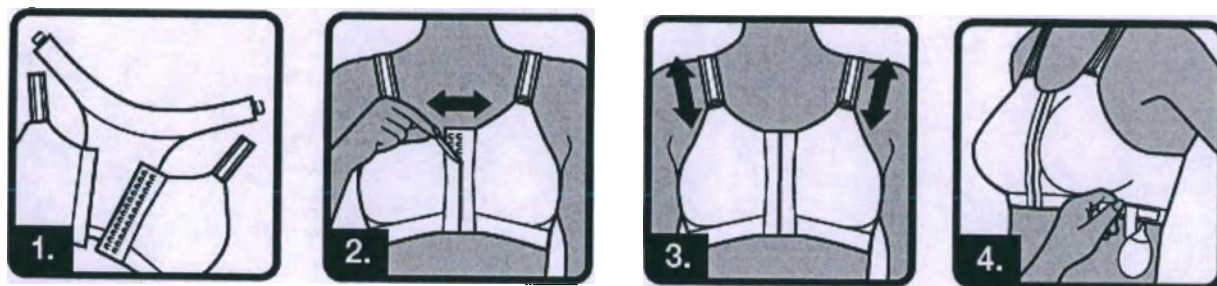

Назначение:

Медицинское изделие для послеоперационного использования после операций на молочной железе, особенно мастэктомии и лампэктомии. С петлями для дренажных трубок и карманами для вкладышей в бюстгальтер.

Инструкция по применению:

1. Бюстгальтер может быть полностью открыт как спереди, так и на плечевых ремнях, что позволяет легко применять и регулировать его в операционной и/или во время восстановления для легкого осмотра раны.
2. Регулируемая передняя застежка с 2 рядами по 8 крючков позволяет регулировать поддержку/компрессию.
3. Отрегулируйте плечевые ремни так, чтобы бюстгальтер не раздражал кожу, но обеспечивал оптимальную поддержку под грудью и подмышками и было комфортное ощущение в носке.
4. Поместите дренаж в петлю и поместите петлю на бюстгальтер. Плотнo надавите на липучку. Максимум 500 мл.

Меры предосторожности:

Если у вас есть какие-либо вопросы относительно использования и правильной подгонки, пожалуйста, проконсультируйтесь с вашим врачом или медсестрой. Убедитесь, что все бинты и/или дренажные трубки под бюстгальтером расположены правильно, чтобы избежать точек давления и/или затруднения оттока из дренажных трубок. Максимальный вес на каждой петле 500 мл.

Бюстгальтер необходимо снять во время лучевой терапии, так как он содержит металлические детали. Если возникнет какой-либо неожиданный дискомфорт или раздражение раны, пожалуйста, обратитесь к врачу или медсестре.

Уход:

Застегните крючки перед стиркой. Стирать с бельем похожего цвета в стиральном мешке. Отстегните петлю от бюстгальтера перед стиркой. Использование отбеливателя на основе хлора или дезинфекция на основе хлора уменьшает долговечность и функциональность.


Перевод краткой инструкции для потребителя:

carefix

Создающий функциональный комфорт

Ava

Бесшовный послеоперационный
бюстгальтер

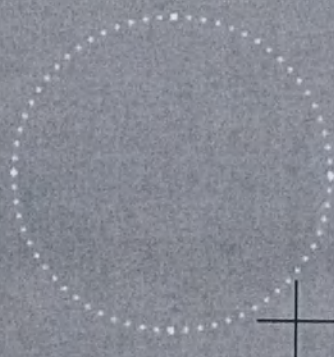

Зоны поддержки/компрессии



Дышащее



Тянется в 4 стороны




Бесшовное



Полностью расстегивающийся



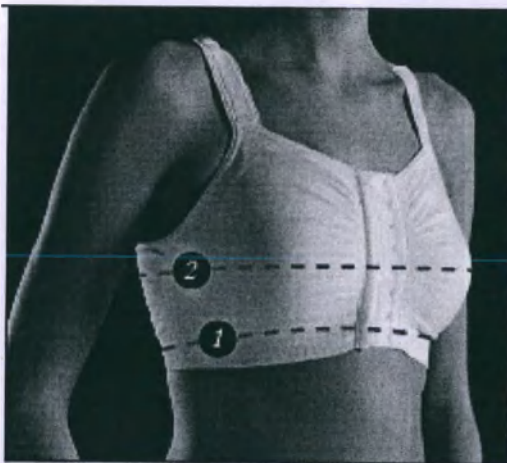

Артикул 3444

Поступила



ВАЖНО
Всегда измеряйте себя, чтобы определить правильный размер бюстгальтера. Для оптимальной посадки, мы рекомендуем измерять после операции и. Если измерение производится до операции, возможно понадобится бюстгальтер больше на 1-2 размера, указанных в таблице Кейрфикс, из-за послеоперационного отека. Обратитесь за консультацией к своему хирургу, медсестре или дилеру для правильной идентификации размера. Для более сильной компрессии выберите бюстгальтер на размер меньше, для меньшей компрессии - на размер больше.

1

Подберите нужный размер

Измерьте обхват непосредственно под грудью (обхват под грудью)

2

Измерьте обхват груди по самым выступающим точкам (обхват груди)

3

Разница между обхватом под грудью и обхватом груди является Размером Чашки, например:
(Обхват груди - Обхват под грудью = Размер Чашки)

См 95-80=15 см, т.е. Чашка В

10-12 см = Чашка АА

12-14 см = чашка А

14-16 см = чашка В

16-18 см = чашка С

18-20 см = чашка Д

20-22 см = чашка Е

4

Чтобы определить размер бюстгальтера, воспользуйтесь Обхватом под грудью и Размером чашки. Если ваш Обхват под грудью 80 см и Размер чашки В, воспользуйтесь размерной таблицей Кейрфикс чтобы найти подходящий размер (размер М в таблице ниже)


Метод измерения в соответствии с EN 13402-3:2017

См. видео:



Обхват под грудью	CM	65 cm	70 cm	75 cm	80 cm	85 cm	90 cm	95 cm	100 cm	105 cm	110 cm	115 cm	120 cm	125 cm	130 cm
	IN	26 in	28 in	30 in	32 in	34 in	36 in	38 in	40 in	42 in	44 in	46 in	48 in	50 in	52 in
Размер Чашки	A														
	B		S(Cup A-C)	M(Cup A-C)			L(Cup A-C)				XL(Cup A-C)		2XL(Cup A-C)		
	C														
	D														
	E	S(Cup D-F)	M(Cup D-F)			L(Cup D-F)			XL(Cup D-F)		2XL(Cup D-F)				
	F														

89% полиамид
11% эластан

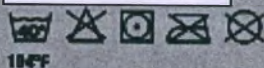

100%

Застегните молнию перед стиркой. Стирать с бельем похожего цвета в стиральном мешке. Использование отбеливателя на основе хлора или дезинфекция на основе хлора уменьшает долговечность и функциональность.

P287601-03-2020




www.carefix.eu

Tytex A/S сертифицирован в соответствии с ISO 9001, ISO 14001 и ISO 13485
Сделано в Словакии компанией: Tytex A/S Industrvej 21 • DK-7430 Ikast • www.tytex.com



TYTEX

Пожалуйста, сохраните эту инструкцию для дальнейшего применения

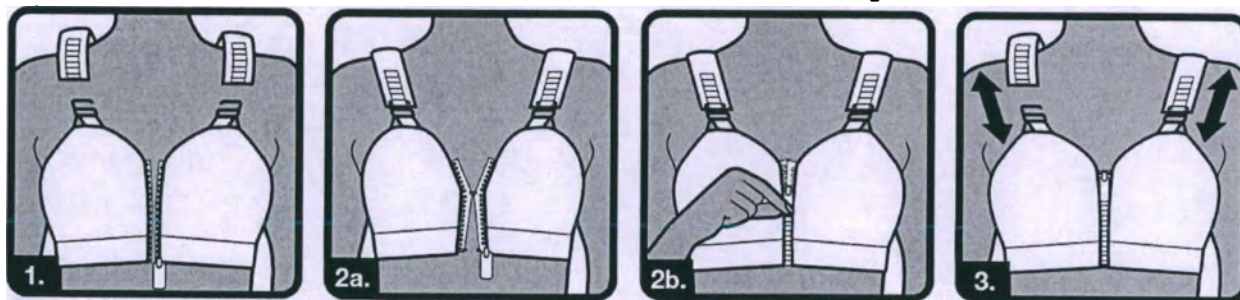

Назначение:

Медицинское изделие для послеоперационного использования после операции на молочной железе, особенно увеличения груди. Также подходит при уменьшении груди, подтяжке груди или реконструкции груди.

Инструкция по применению:

1. Бюстгальтер может быть полностью открыт как на груди, так и на плечах, что позволяет легко наносить и регулировать его в операционной и/или во время восстановления. Передняя застежка также обеспечивает легкий осмотр раны.
2. Когда бюстгальтер надет, сначала застегните крючок посередине, затем крючок внизу (2а), а затем молнию (2в).
3. Отрегулируйте плечевые ремни так, чтобы бюстгальтер не раздражал кожу, чувствовался комфорт в носке и оптимальная поддержка под грудью. Для дополнительной поддержки груди используйте регулировку на плечевых ремнях.

Меры предосторожности:

Если у вас есть какие-либо вопросы относительно использования и правильного надевания, пожалуйста, проконсультируйтесь с вашим врачом или медсестрой. Убедитесь, что все бинты и/или дренажные трубки под бюстгальтером расположены правильно, чтобы избежать точек давления и/или затруднения оттока из дренажных трубок. Перед использованием проконсультируйтесь с врачом или хирургом. Всегда следуйте рекомендациям хирурга. Если возникнет какой-либо неожиданный дискомфорт или раздражение раны, пожалуйста, обратитесь к врачу или медсестре.

Уход:

Застегните молнию перед стиркой. Стирать с бельем похожего цвета в стиральном мешке. Использование отбеливателя на основе хлора или дезинфекция на основе хлора уменьшает долговечность и функциональность.

care

Создающий функциональный комфорт

Lisa

Бесшовный послеоперационный бюстгальтер



Зоны поддержки/компрессии



Дышащее



Тянется в 4 стороны




Бесшовное




Полностью расстегивающееся



Не содержит латекс

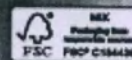

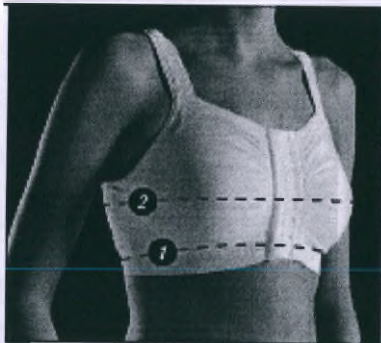

Артикул 3471
Доступные цвета:



ВАЖНО

Всегда измеряйте себя, чтобы определить правильный размер бюстгалтера. Для оптимальной посадки, мы рекомендуем измерять после операции. Если измерение производится до операции, возможно понадобится бюстгалтер больше на 1-2 размера, указанных в таблице Кейрфикс, из-за послеоперационного отека. Обратитесь за консультацией к своему хирургу, медсестре или дилеру для правильной идентификации размера. Для более сильной компрессии выберите бюстгалтер на размер меньше, для меньшей компрессии - на размер больше.

Подберите нужный размер

1

Измерьте обхват непосредственно под грудью (обхват под грудью)

2

Измерьте обхват груди по самым выступающим точкам (обхват груди)

3

Разница между обхватом под грудью и обхватом груди является Размером Чашки, например:

(Обхват груди - Обхват под грудью = Размер Чашки)

См 95-80=15 см, т.е. Чашка В

10-12 см = Чашка АА

12-14 см = чашка А

14-16 см = чашка В

16-18 см = чашка С

18-20 см = чашка Д

20-22 см = чашка Е

4


Чтобы определить размер бюстгалтера, воспользуйтесь Обхватом под грудью и Размером чашки. Если ваш Обхват под грудью 80 см и Размер чашки В, воспользуйтесь размерной таблицей Кейрфикс чтобы найти подходящий размер (размер М в таблице ниже)

Метод измерения в соответствии с EN 13402-3:2017

См. видео:

Обхват под грудью	CM	60 cm	65 cm	70 cm	75 cm	80 cm	85 cm	90 cm	95 cm	100 cm	105 cm	110 cm	115 cm	120 cm
Размер Чашки	IN	24 in	26 in	28 in	30 in	32 in	34 in	36 in	38 in	40 in	42 in	44 in	46 in	48 in
AA														
A			S(Cup AA-B)		M(Cup AA-B)		L(Cup AA-B)		XL(Cup AA-B)		2XL(Cup AA-B)		3XL(Cup AA-B)	
B														
C														
D			S(Cup C-E)		M(Cup C-E)		L(Cup C-E)		XL(Cup C-E)		2XL(Cup C-E)		3XL(Cup C-E)	
E														

55% полиамид
33% хлопок
9% эластан
3% полиэстер

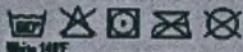

Застегните молнию и крючки перед стиркой. Стирать с бельем похожего цвета в стиральном мешке. Использование отбеливателя на основе хлора или дезинфекция на основе хлора уменьшает долговечность и функциональность.



Ty
E-
Int

Tytex A/S сертифицирован в соответствии с ISO 9001, ISO 14001 и ISO 13485
Сделано в Словакии компанией: Tytex A/S Industrvej 21 • DK-7430 Ikast • www.tytex.com

Americas: +1-855-589-6131

www.carefix.eu




Tytex A/S has been certified according to ISO 9001, ISO 14001 and ISO 13485
Made in Slovakia by: TYTEX A/S • Industrvej 21 • DK-7430 Ikast • www.tytex.com



TYT

Пожалуйста, сохраните эту инструкцию для дальнейшего применения

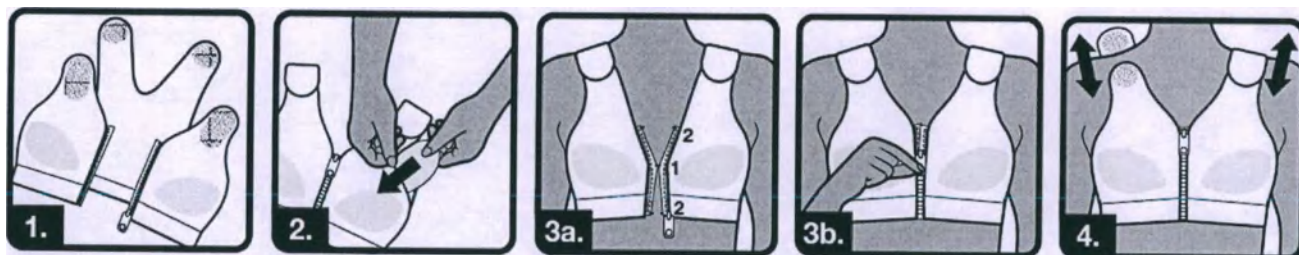

Назначение:

Медицинское изделие для послеоперационного использования после операции на молочной железе, особенно лампэктомии. С карманами для вкладышей для бюстгальтера.

Инструкция по применению:

Для комфортного ношения и поддержки/компрессии, которые можно регулировать выбором размера. Обеспечивает защиту ран и рубцов. Широкие плечевые ремни и высокая спинка освобождают шею, плечи и спину. Бюстгальтер бесшовный и удобный в использовании.

1. Бюстгальтер может быть полностью открыт как на груди, так и на плечевых ремнях, что позволяет легко применять и регулировать его в операционной и/или во время восстановления. Передняя застежка позволяет легко осмотреть рану.
2. При необходимости поместите вкладыши для бюстгальтера в карманы бюстгальтера до того, как он будет надет.
3. Когда бюстгальтер надет, сначала застегните крючок посередине, затем два других крючка в случайном порядке (3a), а затем молнию (3b).
4. Отрегулируйте плечевые ремни с помощью липучки, чтобы бюстгальтер не раздражал кожу, обеспечивал оптимальную поддержку под грудью и подмышками и чувствовался комфорт.

Меры предосторожности:

Если у вас есть вопросы по использованию и правильному надеванию, пожалуйста, проконсультируйтесь с вашим врачом или медсестрой. Убедитесь, что бандажи и / или дренажные трубки под бюстгальтером размещены правильно, чтобы избежать давления и / или препятствовать протеканию дренажных трубок. Если возникнет неожиданный дискомфорт или раздражение, проконсультируйтесь с вашим врачом или медсестрой.

Уход:

Застегните молнию и крючки перед стиркой. Стирать с бельем похожего цвета в стиральном мешке. Использование отбеливателя на основе хлора или дезинфекция на основе хлора уменьшает долговечность и функциональность.

113.5 MHz 

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

107

www.oxfordjournals.org

© 1997 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. Printed in the United States of America. This book is printed on acid-free paper.

might need the 1-2 sizes larger. For indicated by the Camsiz size chart, due to post-surgical swelling. Check labels.

Always measure yourself to find the right size of Carita bra. For optimal fit, we recommend to measure after waking. 

16 - 18 cm / 6.3 - 7.1 in - Cyp C
18 - 20 cm / 7.1 - 7.9 in - Cyp D
20 - 22 cm / 7.9 - 8.7 in - Cyp E

Available colours:

- 10 - 12 cm / 4.0 - 4.7 in = Cup AA
- 12 - 14 cm / 4.7 - 5.5 in = Cup A
- 14 - 16 cm / 5.5 - 6.3 in = Cup B

(Bust Size - Band Size = Cup size)
 CM 85 - 80 = 5 cm, i.e. Cup B
 In 36 - 32 = 4 in, i.e. Cup B

The difference between the Band Size and the Bust Size shows your Cup Size, example:

3



2 Measure around your body, at the fullest part of the breast (Bust Size)

Find the right size
Measure around your body, just under
your breast (Band Size)




0_Bonnie_EndeMed_BH_Insert_113,5x420mm_v2.indd 1 16/04/2011

INFO@CIRMI.RU WWW.GOSDRAVNADZOR.RU

INFO@SIRPI.RU WWW.SOCEDRATNADOL.RU

PLEASE KEEP THIS INSTRUCTION FOR FURTHER REFERENCE

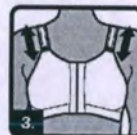

fytex Customer Service:
e-mail: customer.service@fytex.com
international: +45 9950 4200
+45 2262 762014
mobile: +1-855-550-6131

Tytext Customer Service:
E-mail: customerservice@tytext.com
International: +45 2950 4200
+45 2252 762014
America: +1-855-560-4131

006

Перевод краткой инструкции для потребителя:

carefix®

Создающий функциональный комфорт

Bonnie

Бесшовный послеоперационный
бюстгальтер



Зоны поддержки/компрессии



Дышащее



Тянется в 4 стороны
расстегивающееся




Бесшовное




Полностью



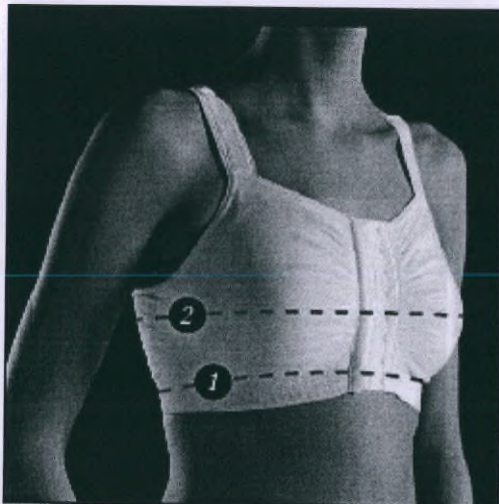

Артикул 3609
Доступные цвета:

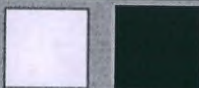

ВАЖНО

Всегда измеряйте себя, чтобы определить правильный размер бюстгальтера. Для оптимальной посадки, мы рекомендуем измерять после операции и. Если измерение производится до операции, возможно понадобится бюстгальтер больше на 1-2 размера, указанных в таблице Кейрфикс, из-за послеоперационного отека. Обратитесь за консультацией к своему хирургу, медсестре или дилеру для правильной идентификации размера. Для более сильной компрессии выберите бюстгальтер на размер меньше, для меньшей компрессии - на размер больше.

1

Подберите нужный размер

Измерьте обхват непосредственно под грудью (обхват под грудью)

2

Измерьте обхват груди по самым выступающим точкам (обхват груди)

3

Разница между обхватом под грудью и обхватом груди является Размером Чашки, например:
(Обхват груди - Обхват под грудью = Размер Чашки)

См 95-80=15 см, т.е. Чашка В

10-12 см = Чашка АА

12-14 см = чашка А

14-16 см = чашка В

16-18 см = чашка С

18-20 см = чашка Д

20-22 см = чашка Е

4

Чтобы определить размер бюстгальтера, воспользуйтесь Обхватом под грудью и Размером чашки. Если ваш Обхват под грудью 80 см и Размер чашки В, воспользуйтесь размерной таблицей Кейрфикс чтобы найти подходящий размер (размер М в таблице ниже)

Метод измерения в соответствии с EN 13402-3:2017

См. видео:



Обхват под грудью	CM	60 cm	65 cm	70 cm	75 cm	80 cm	85 cm	90 cm	95 cm	100 cm	105 cm	110 cm	115 cm
	IN	24 in	26 in	28 in	30 in	32 in	34 in	36 in	38 in	40 in	42 in	44 in	46 in
Размер Чашки	AA												
	A												
	B		XS	S		M			L		XL		2XL
	C												
	D												
	E												

91% полиамид
9% эластан



104°F

Застегните крючки перед стиркой. Стирать с бельем похожего цвета в стиральном мешке. Использование отбеливателя на основе хлора или дезинфекция на основе хлора уменьшает долговечность и функциональность.

P2600.01-03-2020




www.carefix.eu

Тытек А/С сертифицирован в соответствии с ISO 9001, ISO 14001 и ISO 13485
Сделано в Словакии компанией: Tytex A/S Industrivej 21 • DK-7430 Ikast • www.tytex.com



Пожалуйста, сохраните эту инструкцию для дальнейшего применения

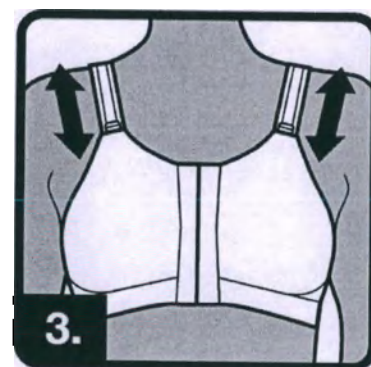

Назначение:

Медицинское изделие для послеоперационного использования после операции на молочной железе.

Особенности:

Обеспечивает поддержку/ компрессию, которые можно регулировать выбором размера и/или с помощью рядов крючков. Защищает раны и шрамы. Широкие плечевые ремни и высокая спинка облегчают нагрузку на шею, плечи и спину. Бюстгальтер бесшовный и удобный в носке.

Инструкция по применению:

1. Бюстгальтер может быть полностью расстегнут как спереди, так и на плечевых ремнях, что позволяет легко применять и регулировать его в операционной и/или во время восстановления.
2. Регулируемая передняя застежка с 2 рядами по 8 крючков 8 крючками обеспечивает легкий осмотр раны и регулирование поддержки/компрессии.
3. Отрегулируйте плечевые ремни так, чтобы бюстгальтер не раздражал кожу, но обеспечивал оптимальную поддержку под грудью и подмышками и ощущался комфорт.

Меры предосторожности:

Если у вас есть какие-либо вопросы относительно использования и правильного надевания, пожалуйста, проконсультируйтесь с вашим врачом или медсестрой. Убедитесь, что все бинты и/или дренажные трубки под бюстгальтером расположены правильно, чтобы избежать точек давления и/или затруднения оттока из дренажных трубок.

Перед использованием проконсультируйтесь с врачом или хирургом. Всегда следуйте рекомендациям хирурга. Бюстгальтер необходимо снять во время лучевой терапии, так как он содержит металлические детали. Если возникнет какой-либо неожиданный дискомфорт или раздражение раны, пожалуйста, обратитесь к врачу или медсестре.

Уход:

Застегните крючки перед стиркой. Стирать с бельем похожего цвета в стиральном мешке. Использование отбеливателя на основе хлора или дезинфекция на основе хлора уменьшает долговечность и функциональность.



1200526 D0470, Ana P2520, Alce P2521, Anna P2522, Raia P2523, Marica P2527, Celia P2528, Celia P2529, Mariana P2530, Kelly P2531

[illegible]

Amerikaner w7

Tytext Customer Service:
 E-mail: customer.service@tytext.com
 Internationally: +353 9445 4300
 Locally: +353 944 221 6331

Перевод краткой инструкции для потребителя:

carefix[®]

Создающий функциональный комфорт

Celia

Бесшовный послеоперационный
бюстгальтер



Дышащее




Тянется в 4 стороны





Артикул 5006/5007
Доступные цвета:

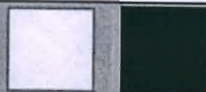

ВАЖНО

Всегда измеряйте себя, чтобы определить правильный размер бюстгалтера. Для оптимальной посадки, мы рекомендуем измерять после операции и. Если измерение производится до операции, возможно понадобится бюстгалтер больше на 1-2 размера, указанных в таблице Кейрфикс, из-за послеоперационного отека. Обратитесь за консультацией к своему хирургу, медсестре или дилеру для правильной идентификации размера. Для более сильной компрессии выберите бюстгалтер на размер меньше, для меньшей компрессии - на размер больше.

Подберите нужный размер

1

Измерьте обхват непосредственно под грудью (обхват под грудью)

2

Измерьте обхват груди по самым выступающим точкам (обхват груди)

3

Разница между обхватом под грудью и обхватом груди является Размером Чашки, например: (Обхват груди - Обхват под грудью = Размер Чашки)

См 95-80=15 см, т.е. Чашка B

10-12 см = Чашка AA

12-14 см = чашка A

14-16 см = чашка B

16-18 см = чашка C

18-20 см = чашка D

20-22 см = чашка E

4

Чтобы определить размер бюстгалтера, воспользуйтесь Обхватом под грудью и Размером чашки. Если ваш Обхват под грудью 80 см и Размер чашки B, воспользуйтесь размерной таблицей Кейрфикс чтобы найти подходящий размер (размер L в таблице ниже)

Метод измерения в соответствии с EN 13402-3:2017

См. видео:



Обхват под грудью	CM	65 cm	70 cm	75 cm	80 cm	85 cm	90 cm	95 cm	100 cm	105 cm	110 cm
	IN	26 in	28 in	30 in	32 in	34 in	36 in	38 in	40 in	42 in	44 in
Размер Чашки	AA										
	A										
	B										
	C			M		L		XL		2XL	
	D										
	E										

60% хлопок
25% полиамид
15% эластан



Coloured 104°F



White 140°F

Стирать с белым похожого цвета в стиральном мешке. Использование отбеливателя на основе хлора или дезинфекция на основе хлора уменьшает долговечность и функциональность.




P252803-03-2020

www.careflx.eu

Tytex A/S сертифицирован в соответствии с ISO 9001, ISO 14001 и ISO 13485
Сделано в Словакии компанией: Tytex A/S Industrvej 21 * DK-7430 Ikast * www.tytex.com



Пожалуйста, сохраните эту инструкцию для дальнейшего применения

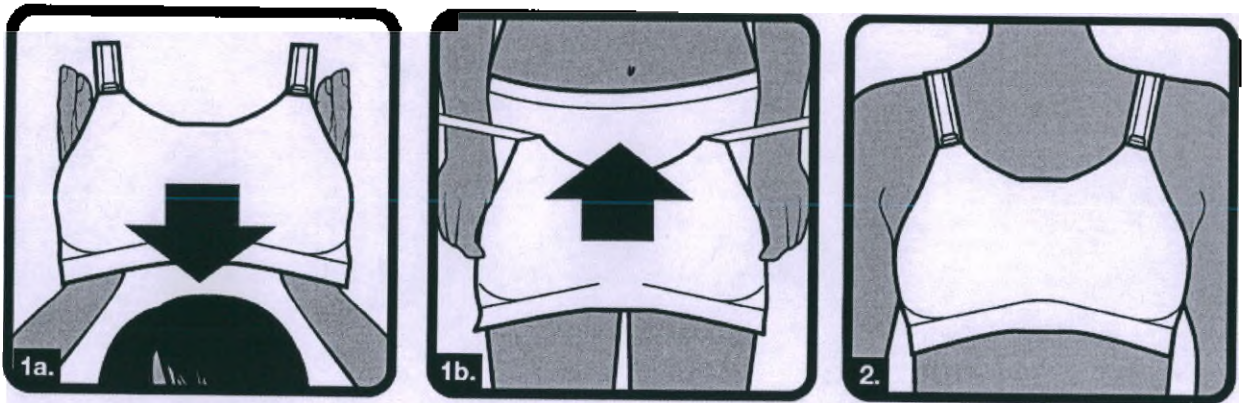

Назначение:

Медицинское изделие для послеоперационного использования после операции на молочной железе или общей хирургии, когда восстанавливается полная подвижность. Также подходит для лучевой терапии (бюстгальтер не содержит металлических деталей).

Инструкция по применению:

1. Натяните через голову (1a) или натяните снизу вверх, как нижнее белье (1b).
2. Отрегулируйте бюстгальтер и убедитесь, что отсутствуют складки

Меры предосторожности:

Если у вас есть вопросы по использованию и правильному надеванию, пожалуйста, проконсультируйтесь с вашим врачом или медсестрой. Убедитесь, что бандажи и / или дренажные трубки под бюстгальтером размещены правильно, чтобы избежать давления и / или препятствовать протеканию дренажных трубок. Если возникнет неожиданный дискомфорт или раздражение, проконсультируйтесь с вашим врачом или медсестрой.

Уход:

Стирать с бельем похожего цвета в стиральном мешке. Использование отбеливателя на основе хлора или дезинфекция на основе хлора уменьшает долговечность и функциональность.

Артикул 8108:

_07906_1200573-P2537_Breast_Puffs_insert-165x335mm.pdf - 14:12:30 - April 16 2020 - Page 1 of 1

■ Cyan ■ Magenta □ Yellow ■ Black

185 mm


carefix
HEALTH CARE SOLUTIONS

Textile Breast Puffs

FOR USE WITH POCKETED BRAS



Adjustable
puff size

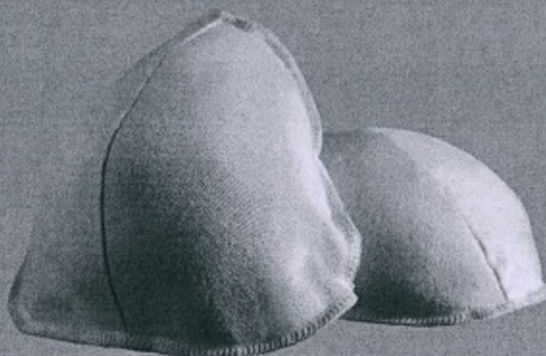


Доступные цвета:


TYTEX

Артикул 8113
77% полиамид
14% эластан
9% хлопок

30°C/86°F Только ручная стирка
Перед стиркой застегните липучку. Стирать с аналогичными цветами.
Использование дезинфекции на
основе хлора приведет к снижению долговечности и функциональности.

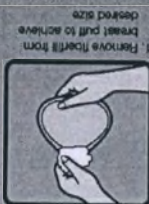

Tytex служба поддержки:
E-mail: customerservice@tytex.com
международный: +45 9660 4200;
+49 2262 762914
В Америке: +1-855-569-6131

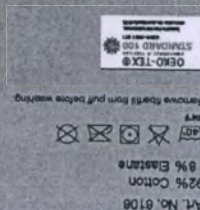

1200573 P2537 Breast Puffs insert 165x335.indd 1

1604/2020 14.06

Tytex A/S сертифицирован в соответствии с ISO 9001, ISO 14001 и ISO 13485
Сделано в Словакии компанией: Tytex A/S Industrvej 21 • DK-7430 Ikast •
www.tytex.com



carefix


Создающий функциональный комфорт

Вкладыш анатомический для бюстгалтера
Для использования с бюстгальтерами с карманом



Регулирующийся размер
вкладыша

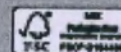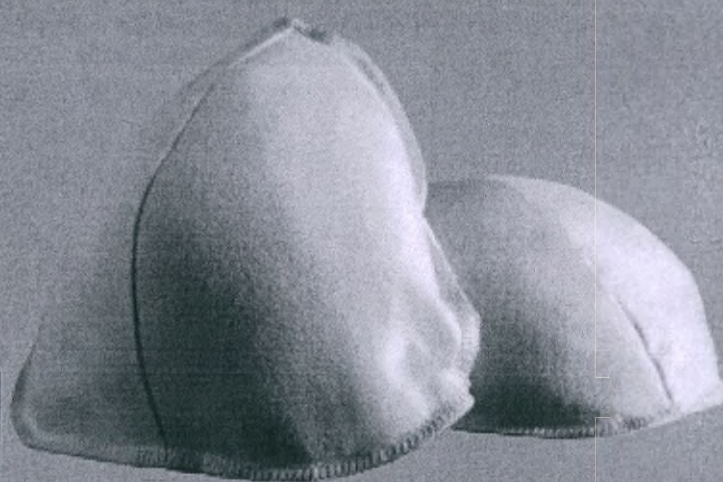

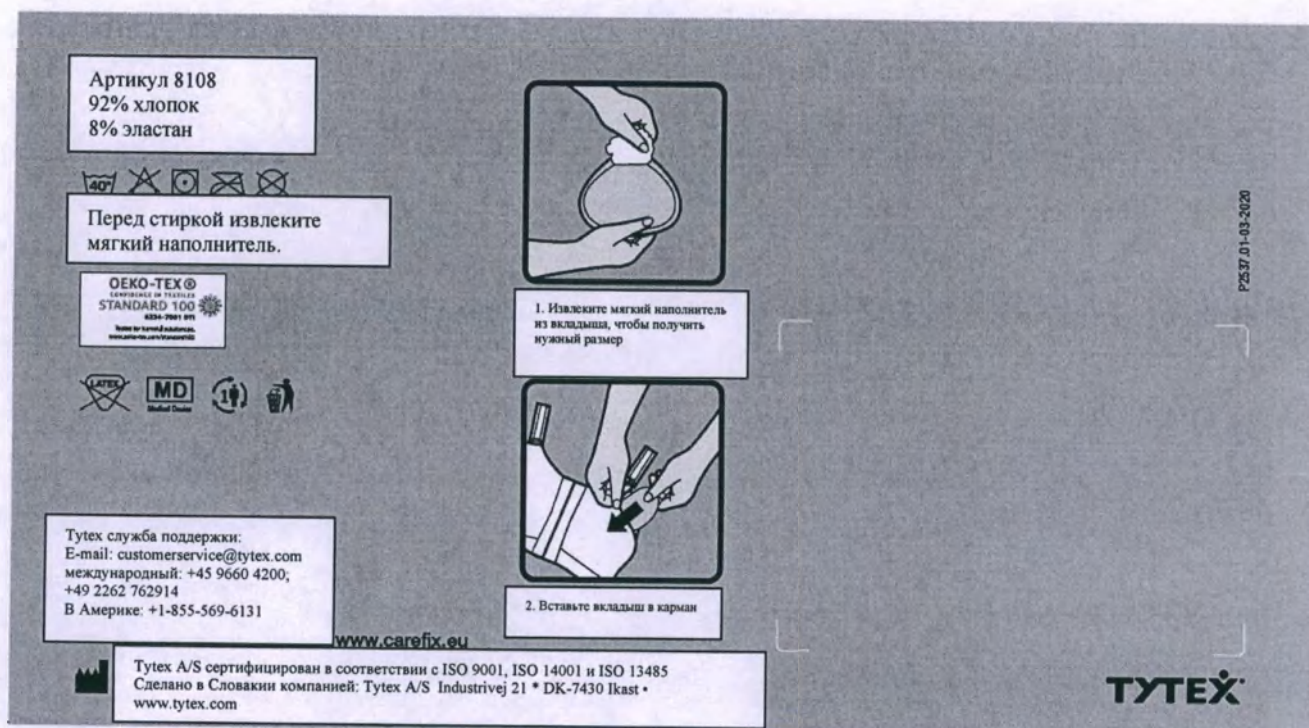

10. Указания по эксплуатации

Продукция Tytex предназначена для эксплуатации при комнатной температуре: от – 50 до +50 °C; и относительной влажности воздуха до 100%.

Не подлежит эксплуатации в мокром виде, эксплуатация осуществляется только в сухом (полностью высушенном после стирки) и неповрежденном виде. Поврежденное (серьезные повреждения в тканевых областях белья: порезы, разрывы) компрессионное белье не подлежит эксплуатации, так как могут вызвать негативные последствия в организме пациента.

Период ношения бюстгальтера.

Как правило, хирург определяет, как долго пациент должен носить послеоперационный бюстгальтер. Каждый хирург рекомендует разное количество времени для ношения бюстгальтера. Это также зависит от вида операции и объема операции. Как правило, период ношения длится от 2 до 12 недель. После хирургии рака молочной железы обычно нужно носить бюстгальтер в течение 6-8 недель, а после косметической хирургии груди, такой как увеличение, уменьшение или подтяжка груди, обычно придется носить бюстгальтер в течение 2-6 недель, однако некоторые хирурги рекомендуют использовать бюстгальтер в течение 12 недель. После реконструкции груди пациент обычно носит послеоперационный бюстгальтер в течение 8-12 недель. Как правило, в течение первых недель пациент должен носить бюстгальтер как днем, так и ночью, но после этого дневного использования может быть достаточно. Однако некоторые хирурги рекомендуют использовать послеоперационный бюстгальтер как днем, так и ночью в течение 12 недель. Следовательно, всегда необходимо обращаться к своему хирургу за советом по поводу периода ношения бюстгальтера.

11. Указания по дезинфекции и стерилизации

Белье медицинское послеоперационное компрессионное CAREFIX поставляется в нестерильном виде и не требует стерилизации или специальной дезинфекции при применении и производстве. В процессе использования для очищения рекомендуется стирка в соответствии с рекомендациями, указанными в инструкции по применению. Периодичность стирки определяется пользователем по мере загрязнения.

Tytex рекомендуют приобретать 2 экземпляра послеоперационного бюстгальтера, чтобы убедиться, что у вас всегда есть запасной экземпляр (в случае стирки одного из них). Одним из ключей к успешному хирургическому результату является постоянная компрессия/поддержка. Для оптимального процесса заживления и периода восстановления место операции всегда должно быть защищено.

12. Требования к техническому обслуживанию и ремонту медицинского изделия

Компрессионное бельё не подлежит техническому обслуживанию и ремонту. В случае серьезных повреждений тканей и иных частей белья необходимо заменить имеющееся изделие на новое, неповреждённое. В случае незначительных повреждений застежек/бретелей следует обратиться в компанию-производитель за консультацией по замене изделия или восстановления имеющегося, если это возможно, путем осуществления мелких швейных работ.

13. Требования безопасности

Все варианты исполнения изделия предназначены для минимизации рисков возникновения негативных реакций у пациента (открытие раны, воспаление раны, раздражение кожи, отеки, гематомы, формирование неправильного анатомического контура, формирование неестественных анатомических контуров, воспаления прилегающих к месту хирургического вмешательства тканей) и содействия заживлению. Риски повышаются в случае несоответствия назначенного послеоперационного белья и проведенной процедуры. Для минимизации этих рисков Tytex предоставляет широкий диапазон моделей, некоторые в различных размерах, и обеспечивает производство всех перевязочных средств и бандажей в соответствии с правильными спецификациями для каждого размера.

Tytex минимизирует риск возникновения аллергических реакций используя гипоаллергенные материалы, без латекса и формальдегида.

14. Условия транспортирования

Транспортировать всеми видами крытого транспорта при соблюдении правил перевозок, для конкретного вида транспорта. При температуре -50 - +50 °C.

15. Условия хранения

Рекомендовано хранение в потребительской упаковке при комнатной температуре (15-25 °C) в сухом помещении (влажность 60% при температуре 25°C). Максимально допустимый температурный режим: -50 - +50 °C.

После вскрытия хранение осуществляется в проветриваемых, сухих помещениях при комнатной температуре (15-25 °C) и нормальном атмосферном давлении. При соблюдении правил эксплуатации и требований безопасности срок использования

изделий определяется износостойкостью использованных материалов и способностью белья поддерживать области человеческого организма.

16. Срок годности и гарантии изготовителя

Срок хранения медицинского изделия: 5 лет.

Срок эксплуатации медицинского изделия определяется количеством стирок, подробнее см. в Технических характеристиках медицинского изделия (Приложение А).

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие качества компрессионного белья всем требованиям технической документации изготовителя, а также требованиям международных и национальных стандартов, указанных в разделе 24, при соблюдении правил транспортирования, эксплуатации и хранения.

17. Утилизация

По истечению срока годности медицинское изделие подлежит утилизации согласно принятым в стране потребителя правилам утилизации тканей, изготовленных из синтетических материалов (полиэстер) и хлопчатобумажной ткани.

Изделие бывшее в использовании перед утилизацией постирать. Изделие, использованное в домашних условиях утилизировать как твердые бытовые отходы. Изделие, использованное в медицинских учреждениях, утилизировать как эпидемически безопасные отходы.

18. Комплектность

Комплект поставки медицинского изделия (артикулы 3086, 3211, 3212, 3270, 3291, 3342, 3444, 3471, 3609, 5006, 5007):

- Бюстгальтер послеоперационный – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Краткая инструкция по применению – 1 шт.
- Упаковка – 1 шт.

Комплект поставки медицинского изделия (артикулы 3343, 3373):

- Бюстгальтер послеоперационный – 1 шт.
- Вкладыш анатомический для бюстгальтера – 2 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Краткая инструкция по применению бюстгальтера – 1 шт.
- Краткая инструкция по применению вкладыша – 1 шт.
- Упаковка – 1 шт.

19. Перечень международных, национальных нормативных документов/стандартов, которым соответствует медицинское изделие

Стандарт	Версия	Название
REACH	2007	Регистрация, оценка, разрешение и ограничение оборота химических веществ
ISO 9001	2015	Системы менеджмента качества. Требования

		(Переиздание)
ISO 14001	2015	Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению
ISO 13485	2016	Изделия медицинские. Системы менеджмента качества. Требования для целей регулирования
93/42/ЕЕС	1993	Директива о медицинском оборудовании
2007/47/ЕС	2007	Директива 2007/47/ЕС Европейского парламента и Совета от 5 сентября 2007 г., вносящая изменения в Директиву Совета 90/385/ЕЕС по сближению законодательств государств-членов, касающихся активных имплантируемых медицинских приборов, Директиву Совета 93/42/ЕЕС, касающуюся медицинских изделий и Директиву 98/8/ЕС, касающуюся размещения на рынке биоцидной продукции
(EU) 2017П45	2017	Регламент о медицинских изделиях (MDR)
21 CFR 820	2020	Регулирование системы качества
21 CFR 803	2020	Отчетность о медицинском оборудовании
21 CFR 801	2020	Требования к маркировке медицинских изделий
ISO 14971	2019	Изделия медицинские. Применение менеджмента риска к медицинским изделиям
MEDDEV 2.7.1	2016	Клиническая оценка
MEDDEV 2.7.3	2015	Сообщения о нежелательных событиях
MEDDEV 2.12.1	2013	Система мониторинга
MEDDEV 2.12.2	2012	Пострыночный клинический мониторинг
MDGC 2019-9	2019	Безопасность и клинических показателей
MDGC 2020-5	2020	Клиническая Оценка - Эквивалентность
MDGC 2020-10/1	2020	Отчетность по безопасности в клинических исследованиях
ISO 15223	2016	Изделия медицинские. Символы, применяемые при маркировании на медицинских изделиях, этикетках и в сопроводительной документации. Часть 1. Основные требования (Переиздание)
EN 62366	2015	Изделия медицинские. Проектирование медицинских изделий с учетом

		эксплуатационной пригодности
ISO 10993-1	2011	Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования
ISO 10993-5	2011	Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro
ISO 10993-10	2011	Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия
ISO 10993-11	2011	Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 11. Исследования общетоксического действия
ISO 14155	2020	Клинические исследования. Надлежащая клиническая практика
ASTM D3787-16	2011	Прочность разрыва для текстиля
ISO 3758	2012	Изделия текстильные. Маркировка символами по уходу
1907/2006	2006	Регистрация, оценка, разрешение и ограничение химических веществ
ISO 11737-1	2018	Стерилизация медицинских изделий. Микробиологические методы. Часть 1. Оценка популяции микроорганизмов на продукции
ISO 2859	2011	Статистические методы. Процедуры выборочного контроля по альтернативному признаку. Часть 1. Планы выборочного контроля последовательных партий на основе приемлемого уровня качества (Переиздание)
EN14704-1	2005	Определение эластичности тканей - Часть 1: тесты Полоски
2001/95/EC	2001	Общие требования к безопасности продукции
ISO 105-C06	2010	Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть C06. Метод определения устойчивости окраски к домашней и промышленной стирке
ISO 105-X12	2016	Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть X12. Метод

		определения устойчивости окраски к трению
ISO 105-B02	2014	Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть B02. Устойчивость окраски к искусственному свету. Метод испытания на выцветание с применением ксеноновой дуговой лампы
ISO 105-E04	2013	Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть E04. Метод определения устойчивости окраски к поту
ISO 13934-1	2013	Материалы текстильные. Свойства тканей при растяжении. Часть 1. Определение максимального усилия и относительного удлинения при максимальном усилии методом полосы
Oeko-Tex 100	2020	Исследования и испытания в области текстильной экологии
ISO 2060	1997	Нити текстильные. Метод определения линейной плотности (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5)
ГОСТ 31214	2016	Изделия медицинские. Требования к образцам и документации, представляемым на токсикологические, санитарно-химические исследования, испытания на стерильность и пирогенность.
ГОСТ Р-52770	2016	Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний

Сертификаты соответствия применяемым стандартам приведены в Приложении В.

20. Рекламации

По вопросам качества медицинского изделия следует обращаться в

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "РЭДЕКС"

Адрес: Россия, г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, д.13, стр. 15, помещение XI, комната 1

Контактный телефон: +7 (499) 370-00-33

E-mail: info@silimed-implant.ru

Перевод с английского языка на русский язык

/печать: МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ/

TyTeX

Всем заинтересованным лицам:

Для целей регистрации, см. во вложении следующие документы:

Английский	Русский
Instruction for use	Инструкция по применению
Medical postoperative compression linen CAREFIX	Белье медицинское послеоперационное компрессионное CAREFIX

Выдал и подписал

Бьярке Лауст Хаагенсен

(Bjarke Laust Haagenzen)

Менеджер по соблюдению
нормативных требований

/подпись/

22.07.2022 г.

Tytex A/S

Industrivej 21

7430 Икаст Дания

TyTeX

MAKING HEALTHCARE MORE HUMAN

Tytex A/S

Industrivej 21

DK-7430 Ikast

Тел.: +45 9660 4200

Факс +45 9660 4201

info@tytex.dk

Торговая палата Дании настоящим подтверждает, что
компания известна нам и зарегистрирована в
соответствующих органах власти Дании.

/подпись/

Торгово-промышленная палата Дании

Секретарь: Лоун Андерсен

АПОСТИЛЬ (Гаагская конвенция от 5 октября 1961 года)			
1. Страна:		Дания	
Настоящий официальный документ			
2. подписан		Лоун Андерсен	
3. действующим в качестве		Секретарь	
4. скреплено печатью/штампом		Торговой палаты Дании	
Удостоверено			
5. в		г. Копенгаген	6. (дата) 17 августа 2022 г.
7. (кем)		Министерство иностранных дел Дании	
8. за №		9F398A8D	
9. Печать/штамп:		/печать: МИНИСТЕРСТ ВО ИНОСТРАННЫ Х ДЕЛ/	10. Подпись: /подпись/ Михаэль Мадсен

/печать: МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ/

Данный апостиль подтверждает только подлинность подписи и полномочия лица, подписавшего этот публичный документ, и в надлежащих случаях подлинность печати или штампа, которые проставлены на данном официальном документе. Данный апостиль не подтверждает содержание документа, в отношении которого он был выдан.

Для проверки подлинности данного Апостиля отсканируйте QR-код или посетите следующий сайт в Интернете:

<https://e-register.um.dk>



Перевод данного текста выполнен переводчиком Котляровым Антоном Игоревичем.

ПОДПИСЬ

Российская Федерация

Город Москва

Шестого сентября две тысячи двадцать второго года

Я, Корсик Владимир Константинович, нотариус города Москвы, свидетельствую подлинность подписи переводчика Котлярова Антона Игоревича.

Подпись сделана в моем присутствии.

Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: № 77/2138-н/77-2022-34-980
Уплачено за совершение нотариального действия: 400 руб. 00 коп.

В. К. Корсик

Гербовая печать
нотариуса города
Москвы Корсика В.К.
ИНН 770474847174*

ПОДПИСЬ



Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью 81 лист(а)(ов)

Нотариус

**Российская Федерация
Город Москва**



Шестого сентября две тысячи двадцать второго года
Я, Корсик Владимир Константинович, нотариус города Москвы,
свидетельствую верность копии с представленного мне документа.
Зарегистрировано в реестре: № 77/2138-н/77-2022-34-981
Уплачено за совершение нотариального действия: 400 руб. 00 коп.

В.К. Корсик

Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью 81 лист(а)(ов)

Нотариус