

ОКП 94 3920

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО
«Компания «ЭЛТА»



Глухов Ю.Ф.

2005 г.

РУЧКА ДЛЯ СКРИФИКАТОРА АВТОМАТИЧЕСКАЯ
«САТЕЛЛИТ»

ЭТИКЕТКА

АЛ00.00.00.000 ЭТ

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. № д/у	Подп. и дата

ОБЩЕ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ПОДПИСЬ
«Компания «ЭЛТА»

2005

Ручка для скарификатора автоматическая «Сателлит» (в дальнейшем – ручка) предназначена фиксации и подачи скарификатора при взятии пробы крови из пальца. Диаметр установочного отверстия для скарификатора 5 мм. Скарификатор для взятия пробы крови в комплект поставки ручки не входит (приобретается потребителем самостоятельно). Ручка поставляется в сборе с наконечником.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Габаритные размеры ручки, мм 110 x 15 x 15.
- Масса ручки, г 60.
- Ручка должна обеспечивать резкое выдвижение с возвратом вставленного скарификатора при нажатии плунжера.
- Ручка должна обеспечивать надежную фиксацию скарификатора.

Класс в зависимости от потенциального риска применения – 1 по ГОСТ Р 51609-2000.

Вид климатического исполнения – УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150, но для работы при температуре, указанной в настоящих технических условиях.

Дезинфекцию проводят в соответствии с МУ-287-113 протиранием наружной поверхности тампоном, смоченным 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением моющего средства типа «Лотос» по ГОСТ 25644.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

1. Отвинтить наконечник ручки;
2. Зафиксировать индивидуальный скарификатор однократного применения в углублении ручки, снять защитный колпачок скарификатора;
3. Привинтить наконечник ручки, установив на нем необходимую глубину проникновения (возрастает от 1 до 5);
4. Приставить ручку к подушечке пальца и нажать на кнопку – скарификатор автоматически произведет укол.

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. Инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата					
					АЛ00.00.00.000 ЭТ				
					Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
					Разраб.			<i>[Подпись]</i>	25.11.05
					Пров.			<i>[Подпись]</i>	25.11.05
					Н.контр.				
					Утв.				
					РУЧКА ДЛЯ СКАРИФИКАТОРА АВТОМАТИЧЕСКАЯ «Сателлит» Этикетка				
					Лит	Лист	Листов		
					О	2	2		
					ООО «Компания «ЭЛТА»				

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Ручка зав. серия
№ _____
соответствует ТУ 9439-001-
78939528-2005 и признана годной к
эксплуатации.

Дата изготовления,
подпись, штамп
ОТК

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие - изготовитель гарантирует нормальную работу ручки в течение одного года с момента продажи.

В течение гарантийного срока неисправности, происшедшие по вине предприятия-изготовителя, устраняются предприятием-изготовителем бесплатно, путем замены.

Предприятие-изготовитель не несет ответственность за неисправности или повреждения элементов ручки в случаях:

- несоблюдения правил применения, хранения и эксплуатации;
- небрежного хранения, обращения и транспортировки.

Предприятие-изготовитель ООО «Компания «ЭЛТА»: 124460 г. Москва, Зеленоград, 4-й Западный проезд, д. 3, стр. 4.

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инд. № дуг.	Подп. и дата

Прошнуровано и пронумеровано
3 (*три*) листа

Генеральный директор



И. В. Сидоров