

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «ФОРМАН Продактс»



В.В. Новиков

СТОЛ МЕДИЦИНСКИЙ «ФОРМАН» (FOREMAN)

по ТУ 32.50.30-001-79722512-2017

Инструкция по применению

ФРМН.942819.001 ИП

г. Санкт-Петербург

2022

ООО «ФОРМАН Продактс» Россия, 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123, литера КБ, корпус №12 Тел: +7 (812) 332-58-43 E-mail: nzaharov@foremanfitness.com	Документ: ФРМН.942819.001 ИП Версия: 1.3 Страница: 2 из 23
--	--

СОДЕРЖАНИЕ

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА	4
1.1 Назначение и условия применения	4
1.2 Показания	4
1.3 Противопоказания	4
1.4 Побочные эффекты	4
1.5 Меры предосторожности	4
1.6 Общий вид стола	5
2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ.....	9
2.1 Основные параметры и характеристики	9
2.2 Требования к сырью, материалам и покупным изделиям	11
2.3 Требования к надежности	13
2.4 Комплектность	13
2.5 Маркировка	13
2.6 Упаковка	14
3 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ	15
4 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ	15
4.1 Эксплуатационные ограничения	15
4.2 Подготовка к эксплуатации	15
5 УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ	16
6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ.....	17
7 ТРЕБОВАНИЯ УТИЛИЗАЦИИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	17
8 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	18
9 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ	19
10 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ.....	20
11 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ	21
12 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.....	22

ООО «ФОРМАН Продактс» Россия, 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123, литера КБ, корпус №12 Тел: +7 (812) 332-58-43 E-mail: nzaharov@foremanfitness.com	Документ: ФРМН.942819.001 ИП
	Версия: 1.3
	Страница: 3 из 23

Настоящая инструкция распространяется на Стол медицинский «ФОРМАН» (FOREMAN) (в дальнейшем – стол) и представляет собой объединенный документ, содержащий сведения о назначении, конструкции, принципе действия и характеристиках стола, необходимые для правильной эксплуатации, транспортирования, хранения, обслуживания и утилизации, а также сведения, удостоверяющие гарантии изготовителя.

 Информация, важная для безопасного применения стола отмечена предупредительным треугольником с восклицательным знаком. Этим указаниям следует уделять особое внимание.

 К эксплуатации допускается медицинский персонал и пациенты, детально изучившие настоящую инструкцию по применению.

 **ВНИМАНИЕ!** Модификация изделия не допускается!

По всем вопросам, касающимся использования стола, необходимо обращаться к изготовителю:

Общество с ограниченной ответственностью «ФОРМАН Продактс»
 Россия, 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123, литера КБ, корпус №12
 Тел: +7 (812) 332-58-43
 E-mail: nzaharov@foremanfitness.com

ООО «ФОРМАН Продактс» Россия, 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123, литера КБ, корпус №12 Тел: +7 (812) 332-58-43 E-mail: nzaharov@foremanfitness.com	Документ: ФРМН.942819.001 ИП
	Версия: 1.3
	Страница: 4 из 23

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1 Назначение и условия применения

Стол медицинский «ФОРМАН» (FOREMAN) (далее – стол) предназначен для хранения медицинских изделий в специализированных помещениях.

Условия применения – лечебно-профилактические учреждения.

В зависимости от потенциального риска применения стол относится к классу I (согласно приказу министерства здравоохранения Российской Федерации №4н от 06.06.2012).

Вид стола в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий 156900 (согласно приказу министерства здравоохранения Российской Федерации №4н от 06.06.2012).

В зависимости от устойчивости к климатическим воздействиям стол относится к виду УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69.

В зависимости от воспринимаемых механических воздействий при эксплуатации стол относится к группе 1; стол подкатной относится к группе 3 по ГОСТ Р 50444-92.

В зависимости от возможных последствий отказа в процессе эксплуатации стол относится к классу Г по ГОСТ Р 50444-92.

1.2 Показания

- организация хранения медицинских изделий.

1.3 Противопоказания

- индивидуальная непереносимость материала.

1.4 Побочные эффекты

Побочные эффекты не наблюдаются при соблюдении требований настоящей инструкции по применению, показаний и противопоказаний.

1.5 Меры предосторожности



Внимание!

- Используйте стол только в соответствии с данной инструкцией.
- Уход за столом осуществлять в соответствии с данной инструкцией.
- Не допускается применять соду, порошки, пасты и другие абразивные материалы, не предназначенные для ухода за столом.
- Не следует ставить на поверхность стола горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.

ООО «ФОРМАН Продактс» Россия, 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123, литера КБ, корпус №12 Тел: +7 (812) 332-58-43 E-mail: nzaharov@foremanfitness.com	Документ: ФРМН.942819.001 ИП
	Версия: 1.3
	Страница: 5 из 23

1.6 Общий вид стола

Стол представляет собой широкую поверхность, укрепленную на одной или нескольких ножках, или тумбах и служащий для того, чтобы ставить или класть что-либо на него, вести письменную работу, для размещения медицинских приборов и аппаратов и т.д.

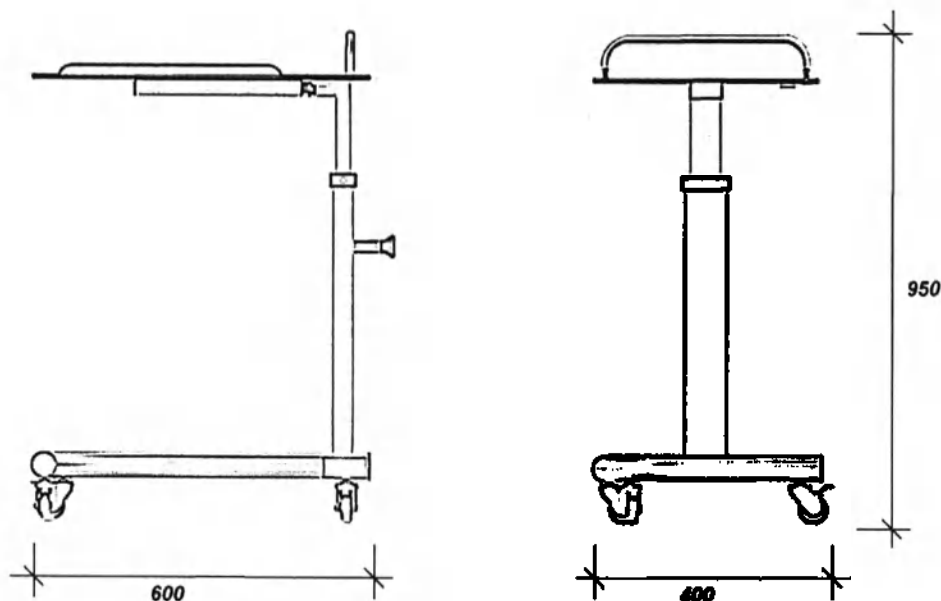


Рисунок 1 - Артикул FP-1-01-03. Стол подкатной «ФОРМАН» (FOREMAN)

Таблица 1 - Размеры стола подкатного «ФОРМАН» (FOREMAN)

	Ширина	Высота	Глубина
Размеры, мм	400	950	600

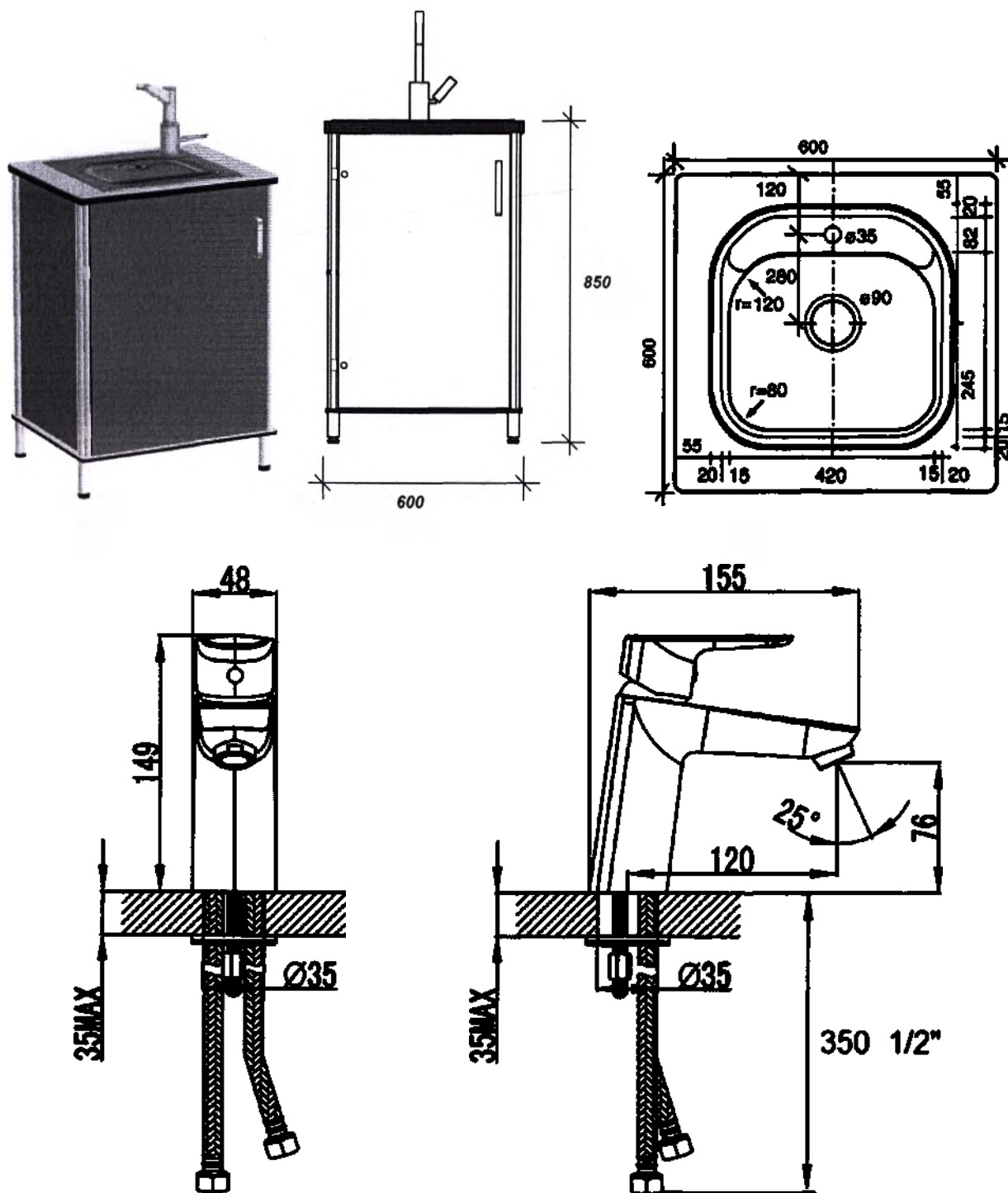


Рисунок 2 - Артикул FP-1-01-11. Стол с мойкой малый «ФОРМАН» (FOREMAN)

Таблица 2 - Размеры стола с мойкой малого «ФОРМАН» (FOREMAN)

Размеры, мм	Ширина	Высота	Глубина
	600	850	600

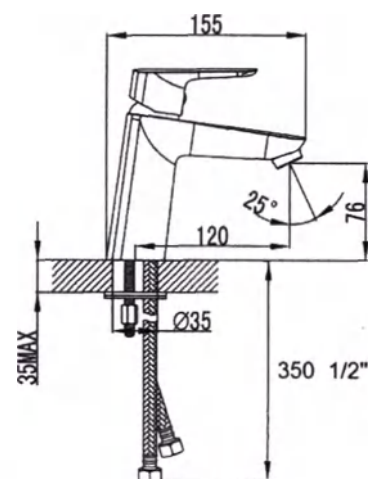
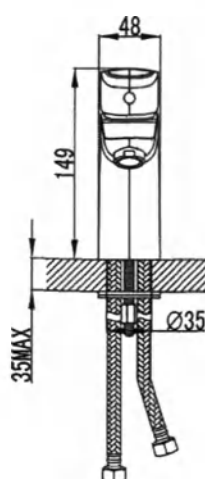
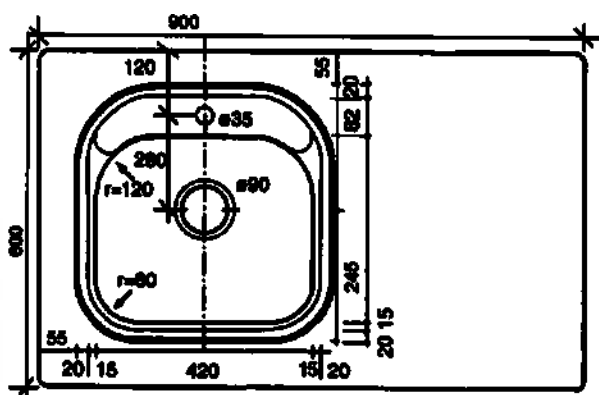
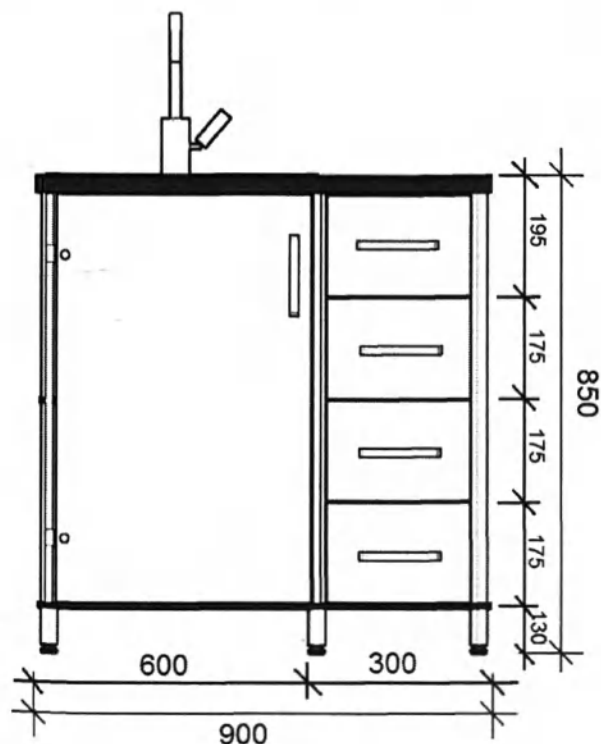
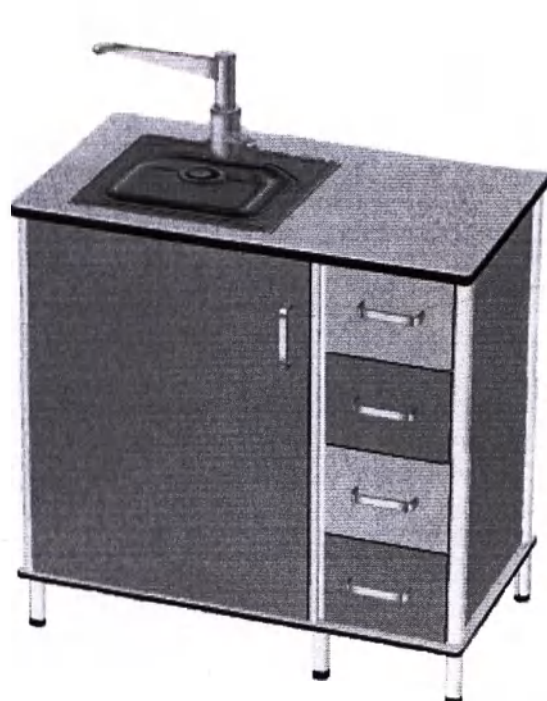


Рисунок 3 - Артикул FP-1-01-12. Стол с мойкой средний «ФОРМАН» (FOREMAN)

Таблица 3 - Размеры стола с мойкой среднего «ФОРМАН» (FOREMAN)

	Ширина стола	Высота стола	Глубина стола	Ящик 4 шт.		
				Ширина	Высота	Глубина
Размеры, мм	900	850	600	280	175	560

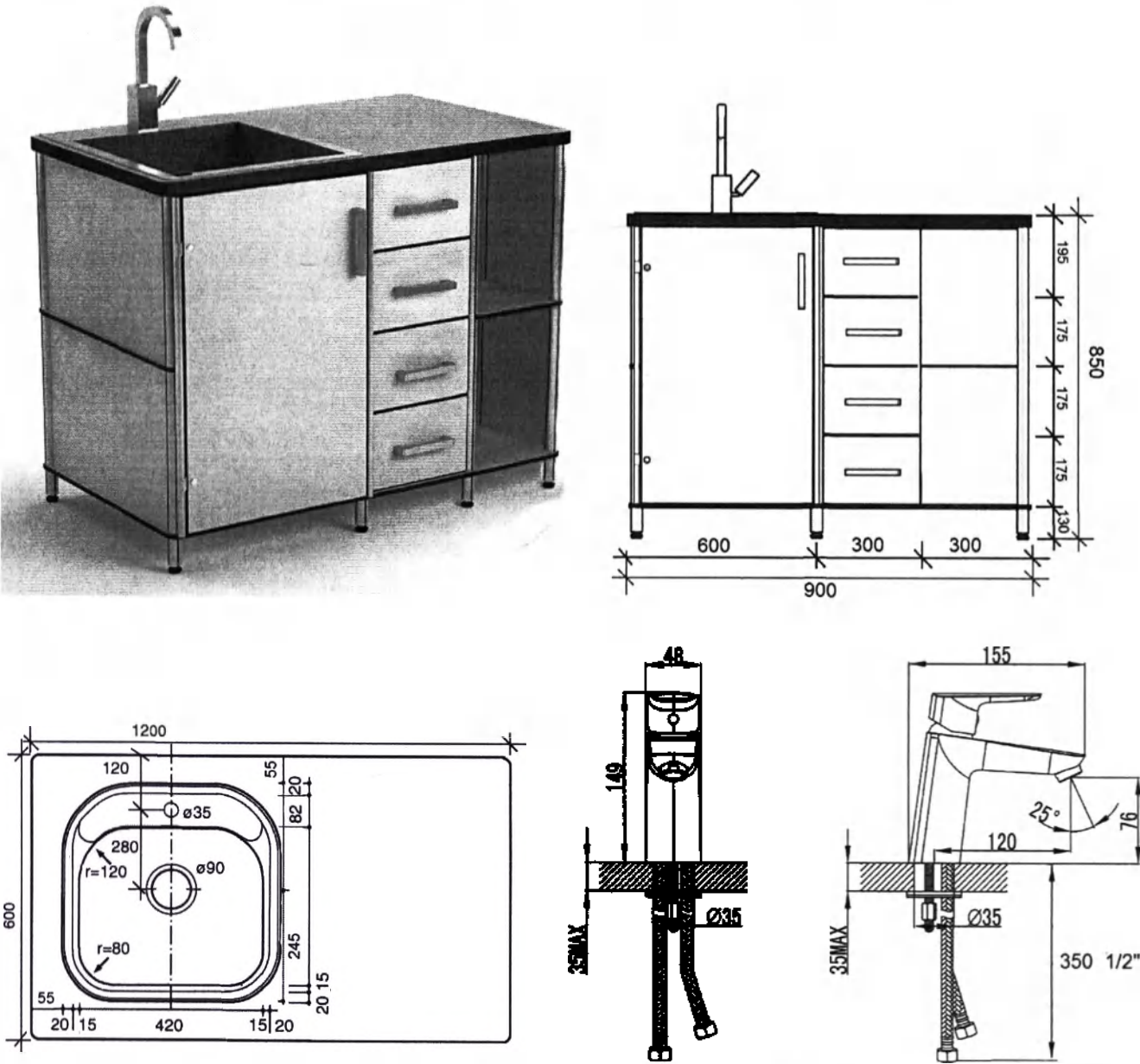


Рисунок 4 - Артикул FP-1-01-13. Стол с мойкой большой «ФОРМАН» (FOREMAN)

Таблица 4 - Размеры стола с мойкой большого «ФОРМАН» (FOREMAN)

	Ширина стола	Высота стола	Глубина стола	Полки 1 шт.		Ящик 4 шт.		
				Ширина	Глубина	Ширина	Высота	Глубина
Размеры, мм	1200	850	600	280	590	280	175	560

ООО «ФОРМАН Продактс» Россия, 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123, литера КБ, корпус №12 Тел: +7 (812) 332-58-43 E-mail: nzaharov@foremanfitness.com	Документ: ФРМН.942819.001 ИП
	Версия: 1.3
	Страница: 9 из 23

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1 Основные параметры и характеристики

2.1.1 Стол соответствует требованиям ГОСТ Р 50444-92, ГОСТ 16371-2014, настоящих технических условий и комплектов конструкторской документации согласно таблице 5.

Таблица 5 – Полный (номенклатурный) перечень изделий

Артикул	Наименование	Обозначение документа	№ Рисунка
FP-1-01-03	Стол подкатной «ФОРМАН» (FOREMAN)	ФРМН.942819.001-03	Рис.1.
FP-1-01-11	Стол с мойкой малый «ФОРМАН» (FOREMAN)	ФРМН.942819.001-11	Рис.2.
FP-1-01-12	Стол с мойкой средний «ФОРМАН» (FOREMAN)	ФРМН.942819.001-12	Рис.3.
FP-1-01-13	Стол с мойкой большой «ФОРМАН» (FOREMAN)	ФРМН.942819.001-13	Рис.4.

2.1.2 Конструкция и внешний вид стола соответствуют рисункам 1-4 раздела 1.6.

2.1.3 Габаритные размеры и масса стола соответствуют значениям, указанным в таблице 16. Предельные отклонения размеров стола не превышают ± 4 мм.

ООО «ФОРМАН Продактс» Россия, 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123, литера КБ, корпус №12 Тел: +7 (812) 332-58-43 E-mail: nzaharov@foremanfitness.com	Документ: ФРМН.942819.001 ИП
	Версия: 1.3
	Страница: 10 из 23

Таблица 6 – Массогабаритные характеристики

Наименование	Габаритные размеры (ШхВхГ), мм	Масса, не более, кг
Стол подкатный «ФОРМАН» (FOREMAN)	400x950x600	27
Стол с мойкой малый «ФОРМАН» (FOREMAN)	600x850x600	25
Стол с мойкой средний «ФОРМАН» (FOREMAN)	900x850x600	35
Стол с мойкой большой «ФОРМАН» (FOREMAN)	1200x850x600	45

2.1.4 Зазоры в проемах на сторону, не предусмотренные технической документацией на изделия, не превышают значений по ГОСТ 16371-2014.

2.1.5 Покоробленность щитовых деталей стола по ГОСТ 16371-2014.

2.1.6 На видимой поверхности стола отсутствуют дефекты по ГОСТ 20400-2013: расхождения полос облицовки, нахлестки, отслоения, пузыри под облицовкой, клеевые пятна, шлифовка, потертость, загрязнение поверхности, вырывы, вмятины, царапины, трещины, пятна, потеки клея, заусенцы и морщины.

2.1.7 Столешницы столов, полки и днища ящиков выдерживают двукратную номинальную равномерно распределенную нагрузку. За номинальную принимают нагрузку массой:

- на столешницу столов 30 ± 1 кг;
- на полку $3 \pm 0,5$ кг;
- на дно ящика 5 ± 1 кг.

2.1.8 Количество и размеры ящиков и полок, а также их расположение соответствуют рисункам 1-14 раздела 1.6. Предельные отклонения размеров не превышают ± 2 мм.

2.1.8.1 Тумбы имеют стеклянные дверцы толщиной $8 \pm 0,5$ мм.

2.1.9 Дверцы стола открываются и закрываются плавно, без перекосов, с усилием не более 20 Н.

2.1.10 Петли дверей интегрированы в алюминиевый профиль, обеспечивая открывание дверей на 175 ± 2 градусов.

2.1.11 Двери стола и ящики без замков имеют устройство, предотвращающее их самопроизвольное открывание.

2.1.12 Выдвижные ящики стола имеют свободный ход без заеданий и перекосов, с усилием выдвижения не более 30 Н.

2.1.13 Ящики имеют устройство для предотвращения выпадения их из корпуса.

2.1.14 Стол устойчиво стоит на опорах. Зазор между одной из опор и поверхностью пола не превышает 3 мм.

2.1.15 Стол устойчив при приложении нагрузки на открытую дверцу 45 Н, либо при приложении нагрузки на выдвинутый ящик 75 Н.

ООО «ФОРМАН Продактс» Россия, 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123, литера КБ, корпус №12 Тел: +7 (812) 332-58-43 E-mail: nzaharov@foremanfitness.com	Документ: ФРМН.942819.001 ИП
	Версия: 1.3
	Страница: 11 из 23

2.1.16 Стол подкатной с колесами оснащен четырьмя одинаковыми колесами диаметром 50 ± 2 мм, колеса снабжены тормозами.

2.1.17 Наибольшее усилие, необходимое для перемещения стола подкатного с колесами по горизонтальному бесшовному полу, с равномерно распределенной полуторакратной нагрузкой, не более 60 Н.

2.1.18 Колеса вращаются на горизонтальной оси свободно, без заедания, от усилия не более 0,35 Н. Колеса вращаются относительно вертикальной оси свободно, без заедания.

2.1.19 Усилие, необходимое для включения/выключения тормоза колеса, не более 150 Н.

2.1.20 Усилие, необходимое для перемещения стола подкатного по твердой плоской поверхности с включенными тормозами. не менее 300 Н.

2.1.21 Опоры стола допускают регулировку не менее, чем на 10 мм.

2.1.22 Защитные и защитно-декоративные покрытия для поверхностей фурнитуры и деталей из металла по ГОСТ 9.032-74, ГОСТ 9.301-86, ГОСТ 9.303-84 для изделий группы условий 1.

2.1.23 Наружные поверхности стола устойчивы к дезинфекции по МУ 287-113 3 % раствором перекиси водорода по ГОСТ 177-88 с добавлением 0,5 % раствора моющего средства типа «Лотос» по ГОСТ 25644-96 или 1 % раствором хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16-89.

2.1.24 Стол при эксплуатации устойчив к воздействию климатических факторов внешней среды в соответствии с требованиями для изделий исполнения УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69.

2.1.25 Стол обладает устойчивостью к механическим воздействиям при эксплуатации, соответствующим требованиям к изделиям группы 1, в свою очередь, стол подкатной относится к группе 3 по ГОСТ Р 50444-92.

2.1.26 Стол в транспортной таре обладает прочностью к воздействию климатических факторов при транспортировании в условиях 5 по ГОСТ 15150-69. Стол в транспортной таре обладает прочностью к воздействию климатических факторов при хранении в условиях 2 по ГОСТ 15150-69.

2.1.27 Стол в транспортной упаковке обладает прочностью к механическим воздействиям при транспортировании, соответствующим требованиям ГОСТ Р 50444-92

2.2 Требования к сырью, материалам и покупным изделиям

2.2.1 Материалы, сырье и покупные изделия, применяемые при изготовлении стола, соответствуют требованиям стандартов или технических условий на эти материалы, сырье и покупные изделия, предусмотренные действующим законодательством, и имеют сопроводительные документы о качестве предприятия-поставщика.

ООО «ФОРМАН Продактс» Россия, 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123, литера КБ, корпус №12 Тел: +7 (812) 332-58-43 E-mail: nzaharov@foremanfitness.com	Документ: ФРМН.942819.001 ИП
	Версия: 1.3
	Страница: 12 из 23

2.2.2 Входной контроль сырья, материалов и покупных изделий, применяемых при производстве стола, проводится в соответствии с требованиями ГОСТ 24297-2013.

2.2.3 Для изготовления стола используются сырье, материалы и покупные изделия согласно таблице 17.

Таблица 7 - Сырье, материалы и покупные изделия

Артикул	Наименование	Материалы Наименование, марка, изготовитель
FP-1-01-03	Стол подкатной «ФОРМАН» (FOREMAN)	Декоративный бумажно-слоистый пластик (High Pressure Laminate), ООО «Слотекс», Россия
		Труба прямоугольная, 40 x 80 мм ГОСТ 8639-82, ПАО «Северсталь», Череповецкий металлургический комбинат, Россия
		Порошковая краска-термореактивный порошковый ЛКМ, Teknos, Финляндия
		Фурнитура алюминиевая AlMg3 по ГОСТ 4784-97, HEFELE FISHER, Германия
FP-1-01-11	Стол с мойкой малый «ФОРМАН» (FOREMAN)	Декоративный бумажно-слоистый пластик (High Pressure Laminate), ООО «Слотекс», Россия
		Профиль алюминиевый марки АД31 по ГОСТ 4784-97, Группа компаний «Авангард», Россия
		Порошковая краска-термореактивный порошковый ЛКМ, Teknos, Финляндия
		Фурнитура алюминиевая AlMg3 по ГОСТ 4784-97, HEFELE FISHER, Германия
		Мойка кухонная нержавеющая сталь 08x18n10 по ГОСТ 5632-2014, Reginox Boston LINEN OKG, Голландия
FP-1-01-12	Стол с мойкой средний «ФОРМАН» (FOREMAN)	Смеситель для умывальника VIBSB00i01, нержавеющая сталь 12X17 по ГОСТ 5632-2014 покрытая хромом X99 ГОСТ 5905-2004, IDDIS, Россия
		Декоративный бумажно-слоистый пластик (High Pressure Laminate), ООО «Слотекс», Россия
		Профиль алюминиевый марки АД31 по ГОСТ 4784-97, Группа компаний «Авангард», Россия
		Порошковая краска-термореактивный порошковый ЛКМ, Teknos, Финляндия
		Фурнитура алюминиевая AlMg3 по ГОСТ 4784-97, HEFELE FISHER, Германия
		Мойка кухонная нержавеющая сталь 08x18n10 по ГОСТ 5632-2014, Reginox Boston LINEN OKG, Голландия
FP-1-01-13	Стол с мойкой большой	Смеситель для умывальника VIBSB00i01, нержавеющая сталь 12X17 по ГОСТ 5632-2014 покрытая хромом X99 ГОСТ 5905-2004, IDDIS, Россия
		Декоративный бумажно-слоистый пластик (High

ООО «ФОРМАН Продактс» Россия, 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123, литера КБ, корпус №12 Тел: +7 (812) 332-58-43 E-mail: nzaharov@foremanfitness.com	Документ: ФРМН.942819.001 ИП
	Версия: 1.3
	Страница: 13 из 23

Артикул	Наименование	Материалы
		Наименование, марка, изготовитель
	«ФОРМАН» (FOREMAN)	Pressure Laminate), ООО «Слотекс», Россия.
		Профиль алюминиевый марки АД31 по ГОСТ 4784-97, Группа компаний «Авангард», Россия
		Порошковая краска-термореактивный порошковый ЛКМ, Teknos, Финляндия
		Фурнитура алюминиевая AlMg3 по ГОСТ 4784-97, HEFELE FISHER, Германия
		Мойка кухонная нержавеющая сталь 08x18n10 по ГОСТ 5632-2014, Reginox Boston LINEN OKG, Голландия
		Смеситель для умывальника VIBSB00i01, нержавеющая сталь 12X17 по ГОСТ 5632-2014 покрытая хромом X99 ГОСТ 5905-2004, IDDIS, Россия
FP-1-01-14	Стол пристенный с тремя тумбами и стеллажами «ФОРМАН» (FOREMAN)	Декоративный бумажно-слоистый пластик (High Pressure Laminate), ООО «Слотекс», Россия
		Профиль алюминиевый марки АД31 по ГОСТ 4784-97, Группа компаний «Авангард», Россия
		Стекло закаленное по ГОСТ 30698-2014, ООО «АКМА», Россия
		Порошковая краска-термореактивный порошковый ЛКМ, Teknos, Финляндия
		Фурнитура алюминиевая AlMg3 по ГОСТ 4784-97, HEFELE FISHER, Германия

2.3 Требования к надежности

2.3.1 Средняя наработка на отказ (To) не менее 5000 часов. Критериями отказа является несоответствие требованиям п.п. 2.1.5 - 2.1.11.

2.3.2 Средний срок службы стола не менее 4 лет. Критерием предельного состояния стола считается невозможность или нецелесообразность его восстановления (или использования).

2.4 Комплектность

2.4.1 Комплект поставки включает в себя:

- Стол одного из исполнений, в сборе
- Эксплуатационная документация:

Инструкция по применению ФРМН.942819.001 ИП

Примечание: количество и исполнение стола определяются при заказе по согласованию с заказчиком.

2.5 Маркировка

2.5.1 Маркировка стола соответствует ГОСТ 16371, ГОСТ Р 50444 и ГОСТ Р ИСО 15223-1-2014.

2.5.2 На каждом изделии этикетка, на которой указано:

ООО «ФОРМАН Продактс» Россия, 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123, литера КБ, корпус №12 Тел: +7 (812) 332-58-43 E-mail: nzaharov@foremanfitness.com	Документ: ФРМН.942819.001 ИП
	Версия: 1.3
	Страница: 14 из 23

- наименование и местонахождение предприятия-изготовителя и (или) товарный знак предприятия;
- наименование изделия, его исполнение;
- обозначение изделия (артикул);
- год изготовления;
- гарантийный срок эксплуатации;
- срок службы;
- заводской номер;
- обозначение настоящих технических условий, ГОСТ 16371-2014.

2.5.3 Транспортная маркировка – по ГОСТ 14192-96.

Транспортная маркировка нанесена на бумажные или картонные ярлыки, или непосредственно на тару, ярлыки прикреплены к упаковке клеем или другими материалами, обеспечивающими сохранность груза и маркировки.

На каждую транспортную тару нанесены манипуляционные знаки, соответствующие значениям: «Хрупкое. Осторожно», «Беречь от влаги», «Верх».

2.6 Упаковка

2.6.1 Упаковка соответствует требованиям ГОСТ 16371-2014, ГОСТ Р 50444-92 и конструкторской документации.

2.6.2 Допускаются иные способы упаковки, обеспечивающие защиту стола от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения, а также наиболее полное использование вместимости транспортных средств и удобство выполнения разгрузочно-погрузочных работ.

ООО «ФОРМАН Продактс» Россия, 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123, литера КБ, корпус №12 Тел: +7 (812) 332-58-43 E-mail: nzaharov@foremanfitness.com	Документ: ФРМН.942819.001 ИП
	Версия: 1.3
	Страница: 15 из 23

3 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

3.1 По санитарно-химическим, токсикологическим и биологическим показателям стол соответствует требованиям стандартов серии ГОСТ ISO 10993-2011, ГОСТ Р ИСО 10993-2-2009, а также нормативных документов, утвержденных в установленном порядке.

4 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

4.1 Эксплуатационные ограничения

 Каждое изделие проходит перед продажей специальную проверку изготовителем. Тем не менее, при транспортировке могут произойти непредвиденные повреждения, не связанные с производством изделия.

Пожалуйста, проведите визуальную оценку упаковки, состояния изделия, чтобы убедиться в отсутствии различных повреждений. Если Вы обнаружите повреждения, обратитесь к Изготовителю.

Рабочие условия окружающей среды:

Температура от плюс 10 до плюс 35°C.

Относительная влажность воздуха: до 80%.

4.2 Подготовка к эксплуатации

При использовании изделия впервые после его приобретения проверьте соответствие комплектности по разделу 2.3 настоящей инструкции по применению.

Использование изделия не требует специального обучения и может быть выполнено силами пользователя.

4.3 Порядок работы с изделием

- Освободите стол от упаковки, выбросьте упаковочный материал.

 Все изделия поставляются готовыми к применению, однако рекомендуется перед первым использованием осуществить дезинфекцию в соответствии с требованиями Раздела 5.

- Используйте изделие в соответствии с его функциональным назначением.

Примечание: Следует учитывать информацию по рекомендуемой нагрузке (п. 2.1.7).

ООО «ФОРМАН Продактс» Россия, 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123, литера КБ, корпус №12 Тел: +7 (812) 332-58-43 E-mail: nzaharov@foremanfitness.com	Документ: ФРМН.942819.001 ИП
	Версия: 1.3
	Страница: 16 из 23

5 УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ

Необходимо регулярно контролировать отсутствие механических повреждений.

Так же необходимо обеспечивать дезинфекцию изделия согласно разделу 5.1 настоящей инструкции.

5.1 Внешние и внутренние доступные поверхности стола протрите салфеткой, смоченной в дезинфицирующем растворе, затем протрите насухо мягкой тканью. В качестве дезинфицирующего раствора рекомендуется использовать 3% раствор перекиси водорода по ГОСТ 177-88 с добавлением 0,5% моющего средства типа "Лотос" или "Астра" по ГОСТ 25644-96 или иные средства согласно МУ 287-113.

 Не допускается применять соду, порошки, пасты и другие абразивные материалы, не предназначенные для ухода за столом.

 Не следует ставить на поверхность стола горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.

ООО «ФОРМАН Продактс» Россия, 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123, литера КБ, корпус №12 Тел: +7 (812) 332-58-43 E-mail: nzaharov@foremanfitness.com	Документ: ФРМН.942819.001 ИП
	Версия: 1.3
	Страница: 17 из 23

6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1 Транспортирование и хранение стола должно проводиться в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444-92.

Транспортирование стола может осуществляться железнодорожным, автомобильным, речным и воздушным видами транспорта в крытых транспортных средствах.

Крепление транспортной упаковки в транспортных средствах и перевозка продукции на них должны проводиться согласно правилам, действующим на соответствующих видах транспорта.

При транспортировании самолетом – в отапливаемом герметизированном отсеке.

6.2 Условия транспортирования стола должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69 (при температуре окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50°C и относительной влажности до 100%).

6.3 Условия хранения стола в транспортной упаковке на складах изготовителя (потребителя) должны соответствовать условиям хранения 2 по ГОСТ 15150-69 (при температуре окружающего воздуха от минус 50 до плюс 40 °C и относительной влажности до 98%).

7 ТРЕБОВАНИЯ УТИЛИЗАЦИИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

7.1 Утилизация должна осуществляться в соответствии с правилами сбора, учёта и утилизации, установленными уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, предусмотренным СанПиН 2.1.7.2790-10.

7.2 Согласно СанПиН 2.1.7.2790-10 стол относится к медицинским отходам класса А – эпидемиологически безопасные отходы.

7.3 Перед утилизацией стол должен быть подвергнут санитарной обработке в соответствии с методическими указаниями МУ-287-113 от 30.12.1998 г.

7.4 Стол должен подлежать утилизации в случае:

- окончания срока эксплуатации;
- подтверждения фактов и обстоятельств, создающих угрозу жизни и здоровью пользователя и свидетельствующих о невыполнении предусмотренного назначения.

7.5 Утилизации должна подлежать вся упаковка, в том числе и транспортная. Утилизации должны подвергаться отдельно бумага, полиэтилен и пластмасса.

ООО «ФОРМАН Продактс» Россия, 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123, литера КБ, корпус №12 Тел: +7 (812) 332-58-43 E-mail: nzaharov@foremanfitness.com	Документ: ФРМН.942819.001 ИП
	Версия: 1.3
	Страница: 18 из 23

8 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

8.1 Использование стола должно осуществляться в соответствии с эксплуатационной документацией.

8.2 К эксплуатации стола допускается медицинский персонал и пациенты, детально изучившие инструкцию по применению.

ООО «ФОРМАН Продактс» Россия, 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123, литера КБ, корпус №12 Тел: +7 (812) 332-58-43 E-mail: nzaharov@foremanfitness.com	Документ: ФРМН.942819.001 ИП
	Версия: 1.3
	Страница: 19 из 23

9 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Стол медицинский «ФОРМАН» (FOREMAN) производства ООО «ФОРМАН Продактс»

Исполнение _____ Артикул _____ Заводской номер _____

принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.

Представитель ОТК

 (личная подпись) (расшифровка подписи) (Дата)

ООО «ФОРМАН Продактс» Россия, 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123, литера КБ, корпус №12 Тел: +7 (812) 332-58-43 E-mail: nzaharov@foremanfitness.com	Документ: ФРМН.942819.001 ИП
	Версия: 1.3
	Страница: 20 из 23

10 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Стол медицинский «ФОРМАН» (FOREMAN)

Исполнение _____ Артикул _____ Заводской номер _____

упакован на предприятии-изготовителе ООО «ФОРМАН Продактс» согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

Упаковывание произвел _____
 (личная подпись) (расшифровка подписи) (Дата)

ООО «ФОРМАН Продактс» Россия, 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123, литера КБ, корпус №12 Тел: +7 (812) 332-58-43 E-mail: nzaharov@foremanfitness.com	Документ: ФРМН.942819.001 ИП
	Версия: 1.3
	Страница: 21 из 23

11 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Претензии в адрес изготовителя представляют при несоответствии поставляемого изделия, его тары, упаковки, маркировки и комплектности требованиям сопроводительной документации.

Все предъявленные рекламации должны регистрироваться заводом-изготовителем и содержать сведения о принятых мерах.

Рекламация, полученная изготовителем, рассматривается в десятидневный срок.

О принятых мерах письменно сообщается потребителю.

Для определения причин повреждений необходимо составить акт, в котором должны быть указаны:

- наименование, артикул и заводской номер изделия;
- дата получения изделия с завода-изготовителя и номер документа, по которому оно получено;
- детальное описание повреждения;
- предполагаемая причина повреждения;
- наименование поврежденных частей и т.д.

Предприятие-изготовитель принимает рекламацию, если не установлена вина получателя в возникновении дефекта в изделии.

ООО «ФОРМАН Продактс» Россия, 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123, литера КБ, корпус №12 Тел: +7 (812) 332-58-43 E-mail: nzaharov@foremanfitness.com	Документ: ФРМН.942819.001 ИП
	Версия: 1.3
	Страница: 22 из 23

12 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

12.1 Изготовитель гарантирует соответствие качества стола требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий и правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

12.2 Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня продажи предприятием-изготовителем.

12.3 Гарантийный срок хранения – 6 месяцев со дня изготовления.

Уважаемые покупатели!

При покупке убедитесь в том, что продавец полностью заполнил гарантийный талон и поставил печать.

Сохраняйте гарантийный талон в течение всего гарантийного срока.

В случае, если изделие не соответствует требованиям технических условий в гарантийный период, обратитесь к продавцу.

Гарантийный срок эксплуатации изделия указан в настоящей инструкции и исчисляется с даты продажи. При обнаружении несоответствия изделия требованиям технических условий покупателю гарантируется бесплатный ремонт или обмен на аналогичный товар надлежащего качества.

Производитель оставляет за собой право отказа по гарантийному обязательству в случае несоблюдения изложенных ниже условий гарантии:

- Гарантия действует только при правильном и четком заполнении гарантийного талона с указанием, даты продажи, четкой печатью фирмы-продавца.

Изделие снимается с гарантийного обслуживания в случаях:

- Если гарантийный талон не предоставлен или информация в нем не полная, неразборчивая или содержит исправления.

- Несовпадения заводского номера изделия с гарантийным талоном
- Наличия механических повреждений
- Несоблюдения правил эксплуатации изделия и т.д.

ООО «ФОРМАН Продактс» Россия, 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123, литера КБ, корпус №12 Тел: +7 (812) 332-58-43 E-mail: nzaharov@foremanfitness.com	Документ: ФРМН.942819.001 ИП
	Версия: 1.3
	Страница: 23 из 23

ФОРМА ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА
на замену в течение гарантийного срока

Стол медицинский «ФОРМАН» (FOREMAN)

Исполнение _____ Артикул _____ Заводской номер _____

Приобретен _____
(дата, подпись и штамп покупателя)

Продавец _____
(подпись, печать)

прошито, пронумеровано, скреплено
печатью 23 (двадцать три) лист(ов)

Генеральный директор
ООО «ФОРМАН ПРОДАКТС»
В.В. Новиков

« 22 » июля 2022 г.

