


“УТВЕРЖДАЮ”

**Генеральный директор
ООО “МП НПФ “ГАММАМЕД-П”**

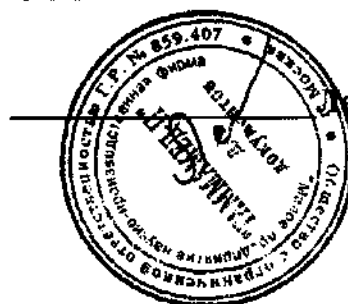

Демченко А.И.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**Комплекты рентгенозащитных средств из материала
резиносвинцового для индивидуальной защиты врача,
пациента и для использования в микропедиатрии при
рентгенодиагностических исследованиях КСИЗ-РС и
КСИЗмп-РС**

Комплекты рентгенозащитных средств из материала резиносвинцового для индивидуальной защиты врача, пациента и для использования в микропедиатрии при рентгенодиагностических исследованиях КСИЗ-РС и КСИЗмп-РС, предназначенные для индивидуальной защиты врача и пациента при рентгенодиагностических исследованиях.

Комплекты предназначены для применения в медицинских лечебно-профилактических учреждениях в условиях стационарных рентгеновских установок, в т.ч. флюорографов.

1. Рентгенозащитные изделия предназначены для защиты медицинского персонала и пациентов от рентгеновского излучения при проведении рентгенодиагностических исследований. Изделия предназначены для защиты определенных частей тела, как указано в разделе «назначение» паспорта на каждое изделие.

2. Изделия должны храниться на стеллажах в расправленном виде в условиях хранения 2 ГОСТ 15150-69 не ближе 1 м от теплоизлучающих приборов. В процессе хранения и эксплуатации изделия не должны подвергаться воздействию кислот, щелочей, масел, растворителей и других веществ, разрушающих резину.

3. После транспортирования в условиях минусовых температур изделия должны быть выдержаны в транспортной упаковке не менее суток при температуре не ниже $+20^{\circ}\text{C}$. Перед непосредственным употреблением необходимо осмотреть поверхность изделий: изделия, имеющие порезы, проколы или другие дефекты к использованию не пригодны.

4. Для работы необходимо выбрать изделия соответствующего свинцового эквивалента. Величина свинцового эквивалента указана на этикетке (ярлыке), расположенной на наружной стороне изделия.

В случае необходимости после окончания работы изделие необходимо протереть раствором, содержащим 5 г/л любого

моющего препарата при температуре + 40° С ручным способом и высушить на воздухе при комнатной температуре.

5. После окончания работы изделия необходимо хранить на стеллаже в развернутом виде или повесить на плечики или вешалку.

6. Изделия дезинфицируют путем протирки их наружной поверхности салфеткой, смоченной 3% раствором перекиси водорода с добавлением 0.5% моющего средства типа “Лотос”. Перед протиркой салфетка должна быть отжата..

7. Гарантийный срок эксплуатации -12 месяцев.

Гарантийный срок хранения - 12 месяцев

Пронумеровано, прошнуровано и
скреплено печатью

А.И. Шенко

