



ИНСТРУКЦИЯ

по применению изделия медицинского назначения
«Шприцы одноразовые стерильные инъекционные с иглами и без игл,
объемом 1мл, 2мл, 3 мл, 5 мл, 10 мл, 20 мл, 30 мл, 50 мл, 100 мл»

1. Назначение

Шприцы одноразовые стерильные инъекционные с иглами и без игл, объемом 1мл, 2мл, 3 мл, 5 мл, 10 мл, 20 мл, 30 мл, 50 мл, 100 мл предназначены для подкожного, внутримышечного и внутривенного введения лекарственных средств, а также для отсасывания различных жидкостей из организма. Проведение инъекций может осуществляться во всех сферах медицинской области в амбулаторных, стационарных, домашних условиях.

Изделия относятся к одноразовым стерильным изделиям. Стерилизация осуществляется оксидом этилена.

2. Основные технические характеристики

Номенклатура выпускаемых шприцев - 1мл, 2мл, 3 мл, 5 мл, 10 мл, 20 мл, 30 мл, 50 мл, 100 мл.

Шприцы комплектуются иглами с силиконовым покрытием и атравматической заточкой, с конусом «Луер» или «Луер-Лок».

3. Противопоказания к применению

Не использовать с нарушенной упаковкой и истекшим сроком годности.

4. Подготовка к работе, порядок работы изделия

Проверить целостность потребительской тары и срок годности.

Вскрыть потребительскую тару, извлечь шприц.

Снять колпачок, набрать в шприц лекарственный препарат.

Расположить шприц с иглой вертикально, выдавить, нажимая на шток-поршень, пузырьки воздуха.

Выполнить инъекцию.

5. Правила хранения и использования

Шприцы должны храниться при температуре от плюс 5° до плюс 40° С и относительной влажности не более 80% при температуре плюс 25° С. Срок хранения – 5 лет от даты изготовления.

После применения шприцы утилизировать в соответствии с национальными стандартами.