

УТВЕРЖДЕНА

«УТВЕРЖДАЮ»

Приказом Росздравнадзора

От _____ 200__ г. № _____

ООО «ТРЕЛАКС»

Максимова Т.К. Марф Ф.И.О.

« 18 » _____ 2008 г.



ИНСТРУКЦИЯ

по применению **БАНДАЖ НА ШЕЙНЫЙ ОТДЕЛ ПОЗВОНОЧНИКА БН6-53**

(наименование изделия медицинского назначения)

2008

1. Наименование изделия: Бандаж на шейный отдел позвоночника БН6-53.

2. Область (место) применения: Применяется в протезно-ортопедической практике для лечения и предупреждения деформаций и повреждений шейного сустава человека.

3. Медицинские свойства изделия:

- бандаж ограничивает сгибание, разгибание и вращение шеи
- согревающий эффект способствует улучшению кровообращения, ускорению восстановления и сокращению сроков выздоровления.

4. Фирменные материалы и технологии. Бандаж изготовлен из пенополиуретана холодного формования оболочка вискоза 100%.

5. Показания к применению:

- Повышенная подвижность шейных позвонков
- Состояние после травмы шейного отдела позвоночника
- Состояние после операции на шейном отделе позвоночника
- Состояние после коррекции смещения шейных позвонков
- Мышечная кривошея

6. Конструктивные особенности. Для фиксации бандаж снабжен застежкой «Велкро» в комплект входит сменный чехол из трикотажа с преимущественным содержанием вискозы.

7. Цветовая гамма: Бежевый, черный.

8. Размерный ряд:

Наименование изделия	Обозначение (индекс)	Размеры, см			Масса, кг
		обхват шеи, L	высота, H	толщина, S	
Бандаж на шейный отдел позвоночника (для детей до 1 года)	БН6-53-4	20,0-25,0	4,0	1,7	0,020±5
	БН6-53-5	20,0-25,0	5,0	1,7	0,030±5
Бандаж на шейный отдел позвоночника (для детей от 1 года)	БН6-53-6	20,0-32,0	6,0	2,2	0,050±5
	БН6-53-7	20,0-32,0	7,0	2,2	0,060±5
	БН6-53-8-1	30,0-35,0	8,0	2,2	0,080±5
Бандаж на шейный отдел позвоночника (для взрослых)	БН6-53-8-2	35,0-45,0	8,0	2,2	0,090±10
	БН6-53-9-1	30,0-35,0	9,0	2,2	0,090±10

(для взрослых)	БН6-53-9-2	35,0-45,0	9,0	2,2	0,100±10
	БН6-53-10-1	30,0-35,0	10,0	2,2	0,100±10
	БН6-53-10-2	35,0-45,0	10,0	2,2	0,110±10
	БН6-53-11-1	30,0-35,0	11,0	2,2	0,110±10
	БН6-53-11-2	35,0-45,0	11,0	2,2	0,120±10
	БН6-53-12-1	30,0-35,0	12,0	2,2	0,115±10
	БН6-53-12-2	35,0-45,0	12,0	2,2	0,125±10
Бандаж на шейный отдел позвоночника (для взрослых)	БН6-53-1-8	30,0-45,0	8,0	3	0,130±10
	БН6-53-1-9	30,0-45,0	9,0	3	0,145±10
	БН6-53-1-10	30,0-45,0	10,0	3	0,160±10
	БН6-53-1-11	30,0-45,0	11,0	3	0,175±10
	БН6-53-1-12	30,0-45,0	12,0	3	0,190±10
	БН6-53-2-8	30,0-45,0	8,0	3	0,150±10
Бандаж усиленный на шейный отдел позвоночника (для взрослых)	БН6-53-2-9	30,0-45,0	9,0	3	0,165±10
	БН6-53-2-10	30,0-45,0	10,0	3	0,180±10
	БН6-53-2-11	30,0-45,0	11,0	3	0,200±10
	БН6-53-2-12	30,0-45,0	12,0	3	0,215±10
	БН6-53-2-12	30,0-45,0	12,0	3	0,230±10

9. Правила и способы надевания. Бандаж устанавливают на передней поверхности шеи, расположив выемку под подбородком, охватывают бандажом шею и застегивают его сзади застежкой «Велкро», отрегулировав длину бандажа по объему шеи.

10. Рекомендованный режим применения (ношения) Режим и сроки пользования определяет врач.

Носится при болях, при занятиях за компьютером, при длительных поездках в транспорте и перед сном.

11. Гарантийные обязательства, порядок возврата и обмена изделия. 1 месяц со дня продажи. Срок службы – не менее 2-х лет.

12. Правила подбора размера (измерительный инструмент, места и правила проведения измерений). Сантиметровой лентой в правильном положении головы измеряем расстояние от угла нижней челюсти до ключицы.

13. Правила ухода (частота и режим стирки/обработки, сушки, меры предосторожности, ограничения). Ручная стирка при температуре не выше +30 °С слабым раствором. Не применять моющие и отбеливающие средства, содержащие хлор. Не применять машинную сушку. Сушить изделия следует не отжимая, разложив их на полотенце, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.

1. Протокол о результатах проведения экспертизы
2. Заключение эксперта
3. Заключение эксперта
4. Заключение эксперта
5. Заключение эксперта
6. Заключение эксперта
7. Заключение эксперта
8. Заключение эксперта
9. Заключение эксперта
10. Заключение эксперта

