



АКТОВИДЕРМ® – жидкая аэрозольная повязка, предназначенная для защиты кожных ран различной этиологии.

ДЕЙСТВИЕ: При нанесении на кожу АКТОВИДЕРМ® образует эластичную пленку с антисептическим эффектом. Пленка высвобождает в течение 20 секунд. АКТОВИДЕРМ® подходит для обработки ран любого размера и проникновения. Образует водонепроницаемый слой, АКТОВИДЕРМ® защищает поврежденную поверхность от микробных инфекций, грибка и механического воздействия. Предотвращает появление мозолей. Уменьшает боль за счет охлаждающего эффекта.

СОСТАВ: Поликарбонатскальцин, хлороформ, хлоргексидин, Фреон 406а.

ПОКАЗАНИЯ: Раны, ожоги, бытовые ожоги, порезы, ссадины, влажные мозоли, асептические операционные раны, трещины, трофические язвы, пролежни.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Перед применением тщательно встряхнуть баллон. Распылять АКТОВИДЕРМ® на поврежденный участок кожи в течение 1–3 секунд с расстояния 20 см, захватывая 1–2 см здоровой кожи. Пленка отходит самостоятельно в течение суток.

Во избежание засорения распылителя необходимо после каждого использования перевернуть баллон вверх дном, нажать на распылительную головку и удерживать ее, пока не выйдет чистый газ.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ: от +5°C до +40°C

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Индивидуальная непереносимость компонентов.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: ОТ НЕОПАСНО!

Не распылять вблизи открытого огня и раскаленных предметов. Предостеречь от воздействия солнечных лучей и нагревания свыше 40 °C. Не разбирать и не давать детям. Не прокалывать и не сжигать.

Не допускать попадания в глаза. Не допускать попадания внутрь. В случае попадания немедленно обратиться к врачу.

СРОК ГОДНОСТИ: 24 месяца.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: Хранить в проветриваемом помещении вдали от источников тепла при температуре от +5 °C до +40 °C.

УТИЛИЗАЦИЯ: Освободить баллон от содержимого и утилизировать как твердые бытовые отходы (медицинские отходы класса А).

Претензии и повлиания отправлять по адресу: ООО «Миллор Групп», 117186, Россия, г. Москва, Нахимовский пр-т, 22. Тел.: +7 (499) 390-50-45.

Назначение: ООО «Миллор Групп», 117186, Россия, г. Москва, Нахимовский пр-т, 22. Тел.: +7 (499) 390-50-45

ТУ 9393-667-0973200-11
ТУ 9393-667-0973200-11
ТУ 9393-667-0973200-11

№ партии: 1137746780500

Дата изготовления: 14.04.2022

БАЛЛОН ПОД ДАВЛЕНИЕМ!
НЕ РАЗРУШАЕТ ОСНОВНОЙ СЛОЙ
ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ



Копия верна;
ген. директор
ООО «Миллор Групп»
Ближневосточный филиал

14.04.2022



ЖИДКАЯ
АЭРОЗОЛЬНАЯ ПОВЯЗКА

АКТОВИДЕРМ®

АКТОВИДЕРМ® – жидкая аэрозольная повязка, предназначенная для защиты кожных ран различного происхождения.

ДЕЙСТВИЕ:

При нанесении на кожу АКТОВИДЕРМ® образует эластичную пленку с антисептическим эффектом.

Пленка высыхает в течение 20 секунд.

АКТОВИДЕРМ® подходит для обработки ран любого размера и происхождения.

Образуя водонепроницаемый слой, АКТОВИДЕРМ® защищает поврежденную поверхность от микробных инфекций, грибка и механического воздействия.

Предотвращает появление мозолей. Уменьшает боль за счет охлаждающего эффекта.

АКТОВИДЕРМ® сохраняет естественный баланс кожи, позволяет ей дышать и способствует быстрой регенерации кожи.

ПОКАЗАНИЯ:

Раны кожи, бытовые ожоги, порезы, ссадины, влажные мозоли, асептические операционные раны, трещины, трофические язвы, пролежни.

СОСТАВ:

Поликарбонатсилоксан, хлороформ, хлоргексидин, Фреон 406a.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: Индивидуальная непереносимость компонентов.

СРОК ГОДНОСТИ: 24 месяца.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

ОГНЕОПАСНО!

Не распылять вблизи открытого огня и раскаленных предметов.

Предохранять от воздействия солнечных лучей и нагревания свыше 40°C.

Не разбирать и не давать детям.

Не прокалывать и не сжигать.

Не допускать попадания в глаза.

Не допускать попадания внутрь.

В случае попадания немедленно обратиться к врачу.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Хранить в проветриваемом помещении вдали от источников тепла при температуре от +5°C до +40°C.

Дата изготовления

Петензии и жалобы отправлять по адресу:
ООО «Миллор Групп», 117186, Россия, г. Москва,
Нахимовский пр-т, 22. Тел.: +7 (499) 390-50-45

РУ № РЗН 2016/4931 от 25.10.2016
ТУ № 9395-167-59773200-15

БАЛЛОН ПОД ДАВЛЕНИЕМ!

НЕ РАЗРУШАЕТ ОЗОНОВЫЙ СЛОЙ
для наружного применения



с 50 ml

ЖИДКАЯ
АЭРОЗОЛЬНАЯ ПОВЯЗКА

АКТОВИДЕРМ®



1



Встряхните баллон

2



Распылите АКТОВИДЕРМ® на поврежденный участок кожи в течение 1-3 секунд с расстояния 20 см, захватывая 1-2 см здоровой кожи

3



Дайте высохнуть. Пленка образуется в течение 20 секунд

4



Для создания более надежной защиты нанесите АКТОВИДЕРМ® в 2-3 слоя

5



Пленка отходит самостоятельно в течение суток

ЭФФЕКТИВНО ЗАЖИВЛЯЕТ:

- Раны
- Ожоги
- Порезы
- Ссадины
- Влажные мозоли
- Асептические операционные раны
- Трещины
- Трофические язвы
- Пролежни



Изготовитель: ООО «Миллор Групп», 117186,
Россия, г. Москва, Нахимовский пр-т, 22.
Тел.: +7 (499) 390-50-45

Копия верна:
ген. директор
ООО «Миллор Групп»
Ближневосточный филиал
14.08.2016
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«МИЛЛОР ГРУПП»
«Millor Group»
ИНН 7727813040
МОСКВА

ВНИМАНИЕ: в момент нанесения повязки возможны следующие побочные эффекты: покраснение, ощущение жжения, незначительная потеря чувствительности кожи!

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

Жидкая аэрозольная повязка выпускается алюминиевом баллоне вместимостью 70 мл, заполнением 50 мл, с клапаном, распылительной головкой и защитным колпачком.

Состав (рабочего раствора): поликарбонатсилоксан, хлороформ, хлоргексидин, пропеллент (Фреон 406a)

Размеры баллона: 118х35 мм

Величина максимального усилия нажатия на распылительную головку – не более 4кгс (40Н).

По биологическому воздействию на пациента используемые материалы соответствуют требованиям ГОСТ Р 52770 и стандартам серии ГОСТ ISO10993.

Средство биологически безопасно.

При нажатии на распылительную головку, происходит распыление раствора полимера на поверхность кожи, после испарения растворителя на коже остается эластичная защитная пленка.



actoviderm.ru

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта при температуре от +5°C до +40°C. Беречь от нагрева.

УТИЛИЗАЦИЯ

Использованные баллоны (пустые баллоны): класс А (эпидемиологически безопасные отходы) по СанПиН 2.1.7.2790-10. Подлежат утилизации как бытовые отходы.

Баллоны с содержимым: класс Г (токсикологически опасные отходы) по СанПиН 2.1.7.2790-10. Подлежат утилизации через специализированные организации, имеющие лицензию на данный вид деятельности.

При необходимости утилизации баллона с остатками раствора в бытовых условиях (штучная утилизация) допускается освободить баллон от содержимого и утилизировать как бытовые отходы

actoviderm.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

ООО «Миллор Групп»,
117186, г. Москва, Нахимовский проспект, д 22,
Тел.: +7 (499) 390-50-45

ТУ № 9393-167-59773200-15
РУ № РЗН 2016/4931 от 25.10.2016

ФОРМА ВЫПУСКА И КОМПЛЕКТНОСТЬ:

Аэрозольный баллон объемом 50 мл,
картонная упаковка, инструкция.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ:

В проветриваемом помещении вдали от источников тепла при температуре от +5 °С до +40 °С.

actoviderm.ru

АКТОВИДЕРМ®
ИНСТРУКЦИЯ

ЖИДКАЯ АЭРОЗОЛЬНАЯ ПОВЯЗКА,
ПРЕДНАЗНАЧЕННАЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ
КОЖНЫХ РАН РАЗЛИЧНОГО
ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Копия
ген. директор
ООО "Миллор Групп"
Блунюк
14.04.2022

ЖИДКАЯ АЭРОЗОЛЬНАЯ ПОВЯЗКА, ПРЕДНАЗНАЧЕННАЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ КОЖНЫХ РАН РАЗЛИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

При нанесении на кожу АКТОВИДЕРМ® образует эластичную пленку с антисептическим эффектом. Пленка высыхает в течение 20 секунд.

АКТОВИДЕРМ® подходит для обработки ран любого размера и происхождения.

Образуя водонепроницаемый слой, АКТОВИДЕРМ® защищает поврежденную поверхность от микробных инфекций, грибка и механического воздействия. Предотвращает появление мозолей. Уменьшает боль за счет охлаждающего эффекта.

АКТОВИДЕРМ® сохраняет естественный баланс кожи, позволяет ей дышать и способствует ее быстрой регенерации.



АКТОВИДЕРМ® ОБЛАДАЕТ СЛЕДУЮЩИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ:



ЗАЩИЩАЕТ ПОВРЕЖДЕННУЮ КОЖУ



ПРЕДОТВРАЩАЕТ ИНФИЦИРОВАНИЕ



НЕВИДИМЫЙ



ЭЛАСТИЧНЫЙ



ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ

actoviderm.ru

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

1 ВСТРЯХНИТЕ БАЛЛОН



2 РАСПЫЛИТЕ АКТОВИДЕРМ® на поврежденный участок кожи в течение 1-3 секунд с расстояния 20 см.



При нанесении АКТОВИДЕРМ® рекомендуется захватывать 2-3 см неповрежденной кожи.

3 ДАЙТЕ ВЫСОХНУТЬ Пленка образуется в течение 20 секунд.



4 ПОВТОРИТЕ Для создания более надежной защиты нанесите АКТОВИДЕРМ® в 2-3 слоя.



5 ПЛЕНКА ОТХОДИТ самостоятельно в течение суток.



actoviderm.ru

АКТОВИДЕРМ® ЭФФЕКТИВНО ЗАЖИВЛЯЕТ:

- РАНЫ
- ОЖОГИ
- ПОРЕЗЫ
- ССАДИНЫ
- ВЛАЖНЫЕ МОЗОЛИ
- АСЕПТИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ РАНЫ
- ТРЕЩИНЫ
- ТРОФИЧЕСКИЕ ЯЗВЫ
- ПРОЛЕЖНИ



Телефон горячей линии:
8-800-222-42-72

actoviderm.ru

Копия верна:
ген. дир.
ООО "Миллор"
Блаунок А.И.
14.04.2022



Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
на 4 (четыре) листах

Должность ген. директор
ООО "Миллор Групп"

Ф.И.О., подпись Внуков А.Ю.

«14» 04 2022г.

