

ВНИМАНИЕ: в момент нанесения повязки возможны следующие побочные эффекты: покраснение, ощущение жжения, незначительная потеря чувствительности кожи!

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

Жидкая аэрозольная повязка выпускается в алюминиевом баллоне вместимостью 70 мл с клапаном, распылительной головкой и защитным колпачком.

Состав (рабочего раствора): поликарбонатсилоксан, хлороформ, хлоргексидин, пропеллент (Фреон 406a)

Размеры баллона: 118x35мм

Величина максимального усилия нажатия на распылительную головку не более 4кгс (40Н).

По биологическому воздействию на пациента используемые материалы соответствуют требованиям ГОСТ Р 52770 и стандартам серии ГОСТ ISO10993.

Средство биологически безопасно.

При нажатии на распылительную головку, происходит распыление раствора полимера на поверхность кожи, после испарения растворителя на коже остается эластичная защитная пленка.



www.actoviderm.ru

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта при температуре от +5 °С до +40 °С. Беречь от нагрева.

УТИЛИЗАЦИЯ

Использованные баллоны (пустые баллоны): класс А (эпидемиологически безопасные отходы) по СанПиН 2.1.7.2790-10. Подлежат утилизации как бытовые отходы.

Баллоны с содержимым: класс Г (токсикологически опасные отходы) по СанПиН 2.1.7.2790-10. Подлежат утилизации через специализированные организации, имеющие лицензию на данный вид деятельности.

При необходимости утилизации баллона с остатками раствора в бытовых условиях (штучная утилизация) допускается освободить баллон от содержимого, и утилизировать как бытовые отходы

www.actoviderm.ru

ТУ 9393-167-59773200-15

Производитель: ООО «Миллор Фарма», 117186, г. Москва, Нахимовский проспект, д. 22, Тел.: +7 (499) 390-18-97

РУ XXXXXXXXXX

ФОРМА ВЫПУСКА И КОМПЛЕКТНОСТЬ

Аэрозольный баллон объемом 50 мл, картонная упаковка, инструкция.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ:

В проветриваемом помещении вдали от источников тепла при температуре от +5 °С до +40 °С.

www.actoviderm.ru

АКТОВИДЕРМ®

ИНСТРУКЦИЯ

ЖИДКАЯ АЭРОЗОЛЬНАЯ ПОВЯЗКА, ПРЕДНАЗНАЧЕННАЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ КОЖНЫХ РАН РАЗЛИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ


ЖИДКАЯ АЭРОЗОЛЬНАЯ ПОВЯЗКА, ПРЕДНАЗНАЧЕННАЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ КОЖНЫХ РАН РАЗЛИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

При нанесении на кожу АКТОВИДЕРМ® образует эластичную пленку с антисептическим эффектом. Пленка высыхает в течение 20 секунд.

АКТОВИДЕРМ® подходит для обработки ран любого размера и происхождения.

Образуя водонепроницаемый слой, АКТОВИДЕРМ® защищает поврежденную поверхность от микробных инфекций, грибка и механического воздействия. Предотвращает появление мозолей. Уменьшает боль за счет охлаждающего эффекта.

АКТОВИДЕРМ® сохраняет естественный баланс кожи, позволяет ей дышать и способствует ее быстрой регенерации.

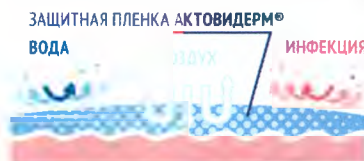

АКТОВИДЕРМ® ОБЛАДАЕТ СЛЕДУЮЩИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ:



ЗАЩИЩАЕТ ПОВРЕЖДЕННУЮ КОЖУ



ПРЕДОТВРАЩАЕТ ИНФИЦИРОВАНИЕ



НЕВИДИМЫЙ



ЭЛАСТИЧНЫЙ



ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ

www.actoviderm.ru

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

ВСТРЯХНИТЕ БАЛЛОН



РАСПЫЛИТЕ АКТОВИДЕРМ® на поврежденный участок кожи в течение 1-3 секунд с расстояния 20 см.



При нанесении АКТОВИДЕРМ® рекомендуется захватывать 2-3 см неповрежденной кожи.

ДАЙТЕ ВЫСОХНУТЬ
Пленка образуется в течение 20 секунд.



ПОВТОРИТЕ
Для создания более надежной защиты нанесите АКТОВИДЕРМ® в 2-3 слоя.



ПЛЕНКА ОТХОДИТ
самостоятельно в течение суток.



АКТОВИДЕРМ® ЭФФЕКТИВНО ЗАЖИВЛЯЕТ:

- РАНЫ
- ОЖОГИ
- ПОРЕЗЫ
- ССАДИНЫ
- ВЛАЖНЫЕ МОЗОЛИ
- АСЕПТИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ РАНЫ
- ТРЕЩИНЫ
- ТРОФИЧЕСКИЕ ЯЗВЫ
- ПРОЛЕЖНИ

Телефон горячей линии:
8-800-222-42-72

www.actoviderm.ru