


КОД ОКП 93 9370

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «Фирма «ФИНКО»

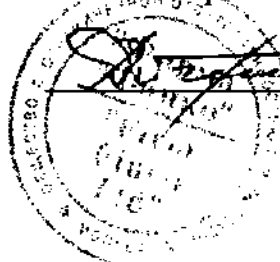

Ветчинкин Д.Н.

ИНСТРУКЦИЯ

ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Материалы перевязочные «Супрасорб»(Suprasorb)
для влажного заживления ран

**Соответствует требованиям международных стандартов
и технической документации производителя
ISO 9001:2000, Сертифицировано в соответствии с требованиями директивы 93/42 ЕЕС и
требованиями СЕ
Соответствует требованиям национальных стандартов**

ГОСТ Р 51148-98

2011

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Материалы перевязочные «Супрасорб» (Suprasorb) для влажного заживления ран.

Компрессы для экссудующих и глубоких ран «Супрасорб А»:

1. Подготовка раны:

Рану следует тщательно очистить. Кожа вокруг раны должна быть чистой и сухой.

2. Наложение повязки на рану:

- Наложить компресс на влажную рану и, если потребуется, подогнать компресс по величине раны, сложив его. При ранах с небольшими выделениями увлажнить рану физиологическим раствором хлористого натрия.
- Глубокие раны легко тампонировать.
- Зафиксировать повязку из кальциевого альгината Suprasorb® А другой повязкой, пригодной для этой цели, например, гидроколлоидной повязкой Suprasorb® Н.

3. Смена повязки:

Смена повязки по указанию лечащего врача, а также в том случае, если через повязку проходит влага, или минимум через 5-7 дней.

Снять фиксирующую повязку и удалить скопившееся в ране желе физиологическим раствором хлористого натрия.

Меры предосторожности

При известной непереносимости или аллергии по отношению к одному или нескольким ингредиентам применять продукт не разрешается.

Гелевый перевязочный материал для некротических ран «Супрасорб G»

1. Подготовка раны:

Рану следует тщательно очистить. Кожа вокруг раны должна быть чистой и сухой.

2. Наложение повязки на рану:

- Подобрать повязку подходящего размера (выступающую на 2-3 см за край раны, при обширных ранах использовать несколько повязок, перекрывая при наложении край соседней повязки). Глубокие раны легко тампонировать.
- Снять с повязки защитный слой бумаги, повязка покрыта защитной бумагой со стороны, прикладываемой к ране.
- Наложить на рану гелевую повязку Suprasorb® G и зафиксировать ее, например, пленочной повязкой, фиксирующим бинтом или также компрессионной повязкой.

3. Смена повязки:

Снять повязку после того, как образовавшееся в повязке утолщение в форме пузыря (вследствие впитывания секрета), превысит площадь раны, или в зависимости от количества выделяемого секрета, но не позднее 5-7 дней.

Меры предосторожности

При известной непереносимости или аллергии по отношению к одному или нескольким ингредиентам применять продукт не разрешается.

Стерильная прозрачная плёнка для перевязки ран «Супрасорб F»

1. Подготовка раны:

Рану следует тщательно очистить. Кожа вокруг раны должна быть чистой и сухой.

2. Наложение повязки на рану:

- Откройте упаковку одноразового использования.
- Разверните пленочную повязку.
- Снимите бумажный защитный слой параллельно вспомогательным краям.
- Держите Suprasorb® F натянутыми без складок и плотно наложите на кожу.
- Удалите вспомогательные края

Указание: Suprasorb® F надежно держится на коже и при длительном ношении

Меры предосторожности

При известной непереносимости или аллергии по отношению к одному или нескольким ингредиентам применять продукт не разрешается.

Гидрогелевый перевязочный материал для поверхностных ран «Супрасорб Н»

1. Подготовка раны:

Рану следует тщательно очистить. Кожа вокруг раны должна быть чистой и сухой.

2. Наложение повязки на рану:

- Удалить защитную пленку
- Наложить на рану гидроколлоидную повязку Suprasorb Н, не прикасаясь при этом пальцами к клейкой поверхности повязки.
- Разгладить повязку на ране, крепко прижимая по краям.

3. Смена повязки:

- Время для смены повязки определяет лечащий врач в зависимости от состояния раны.
- Смена гидроколлоидной повязки Suprasorb Н производится, когда края гелевой подушечки повязки заметно помутнели и начали приближаться к краям раны, или, если из-под повязки начал вытекать экссудат. При смене повязки необходимо предварительно тщательно очистить рану и удалить на ней все омертвевшие частички ткани. На ранах с обильными выделениями можно менять повязку один раз в день, на ранах с умеренными выделениями – с интервалами в несколько дней.
- На ранах, из которых не были полностью удалены омертвевшие частички ткани, следует чаще сменять гидроколлоидную повязку Suprasorb Н.

Меры предосторожности

При инфицировании раны не следует применять гидроколлоидную повязку Suprasorb Н. Если повязка Suprasorb Н применяется при варикозных язвах, следует продолжать назначенное компрессионное лечение. Если повязка Suprasorb Н применяется при декубитальных язвах, следует также продолжать обычное лечение.

Гидроколлоидные повязки Suprasorb Н должны храниться в холодном, сухом помещении и в горизонтальном положении.

При известной непереносимости или аллергии по отношению к одному или нескольким ингредиентам применять продукт не разрешается.

Коллагеновый впитывающий перевязочный материал для поверхностных ран «Супрасорб С»

1. Подготовка раны:

Рану следует тщательно очистить. Кожа вокруг раны должна быть чистой и сухой.

2. Наложение повязки на рану:

- Коллагеновая повязка на раны Suprasorb® С вырезается по величине и форме раны и накладывается на рану нижней стороной в упаковке всухую.

- При малых выделениях из раны или при их отсутствии рекомендуется накладывать коллагеновую повязку Suprasorb® С, предварительно увлажнив ее физиологическим раствором хлористого натрия или раствором Рингера.
- Легким нажатием достигается контакт повязки с пораженной поверхностью раны. Нельзя оставлять открытыми также малые участки ран или прочих дефектов.
- Коллагеновая повязка на раны Suprasorb® С должна оставаться влажной, возможна комбинация с другими продуктами влажной обработки ран (например: Suprasorb® Н гидроколлоидная повязка на раны).


3. Смена повязки:

Смена или дополнительное наложение коллагеновой повязки Suprasorb® С зависит от обстоятельств. Коллагеновая повязка на раны Suprasorb® С удаляется в случае необходимости с помощью физиологического раствора хлористого натрия или при ожогах в ванной с помощью воды без добавок. Если нет других предписаний, производится наложение губки, вырезанной по размеру и форме раны. При свежих ранениях можно оставить повязку до полного заживления раны. При торпидных ранах и язвах, а также ранах с сильными выделениями производится смена повязки каждый день или несколько раз в день. В большинстве случаев коллагеновую повязку Suprasorb® С можно оставлять на ране до полного ее заживления.

Меры предосторожности

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами: Коллагеновую повязку на раны Suprasorb® С не следует применять в комбинации с антисептиками, выделяющими хлор (например, хлорамин), веществами, осаждающими белок (дубильная кислота, азотнокислосеребро) или с прижигающими средствами (настойка йода), изменяющими протеины. Не следует накладывать на коллагеновую повязку Suprasorb® С влажную повязку с дезинфицирующими средствами или медикаментами, содержащими дубильные вещества.

Генеральный директор
ООО «ФИРМА «ФИНКО»

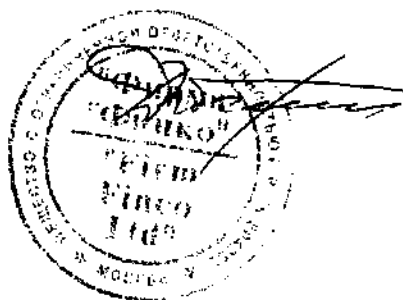

Д.Н. Ветчинкин