



медицинский инструментарий

НПКЦ МИЗ

ООО «НПКЦ «МИЗ»

ПАСПОРТ

Кушетка медицинская ГР-КС по ТУ 32.50.13-008-58588802-2017

Кушетка медицинская ГР-КС по ТУ 32.50.13-008-58588802-2017 предназначена для размещения пациентов при проведении медицинских процедур в смотровых, процедурных и медицинских кабинетах.


Технические данные:

Габариты:

Длина: 1890 мм

Ширина: 580 мм

Высота: 530 мм

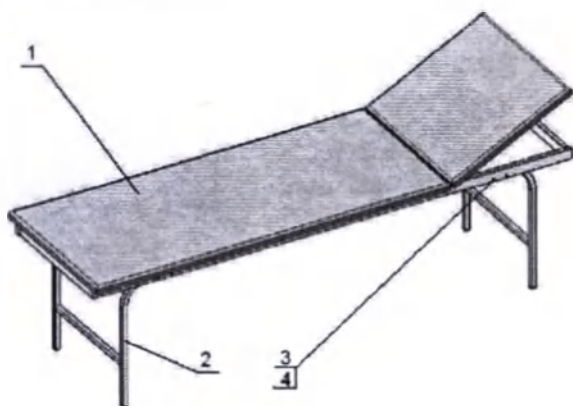

Комплект поставки:

Ложе (поз.1) - 1 шт.

Ножка (поз.2) - 2 шт.

Болт мебельный М8х50 (поз.3) - 8 шт.

Гайка М8 (поз.4) - 8 шт.

Инструкция по сборке:

1. Присоединить ножки (поз.2) к ложу (поз.1) при помощи 8-и болтов М8х50 (поз.3) и 8-и гаек М8 (поз.4). Болты устанавливаются шляпкой с внешней стороны металл-каркаса ложа.
 2. Протянуть все соединения при помощи ключа на «13».
 3. Поднять подголовник в нужное положение.
- Максимально допустимая нагрузка должна быть: не более 200 кг

Гарантийный талон

Модель ГР-КС

Номер партии _____

Производитель: ООО «НПКЦ «МИЗ»

Дата изготовления _____

штамп

Упаковщик:

Продавец: _____

Дата продажи _____

штамп

Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок эксплуатации изделия - 18 месяцев со дня продажи при соблюдении условий транспортирования и хранения. Продавец обязуется провести бесплатную замену изделия в период гарантийного срока при условии соблюдения Покупателем условий хранения, транспортировки. Организация, уполномоченная изготовителем на принятие и удовлетворение требований потребителей в отношении товаров ненадлежащего качества: ООО «НПКЦ «МИЗ», 603087, Нижегородская обл., г. Н. Новгород, Слобода Александровская, д. 241, телефон: +7 (831) 212-44-33.

Регистрационное удостоверение № РЗН 2017/6611 от 25.05.2018 г.



Утверждаю
Директор ООО «НПКЦ» МИЗ
А.А. Лисков
17.10.2022




медицинский инструментарий

НПКЦ МИЗ

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ООО «НПКЦ «МИЗ»

А.А. Листков

«17» октября 2022 г.

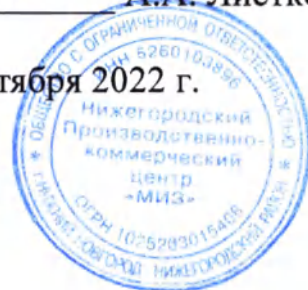

Кушетка медицинская ГР-КС
по ТУ 32.50.30-008-58588802-2017

Руководство по эксплуатации

Содержание

1. Введение	3
2. Технические характеристики	3
3. Требования к персоналу	4
4. Назначение	4
5. Противопоказания	4
6. Комплект поставки	4
7. Сборка кушетки	4
8. Предупреждения и предосторожности	5
9. Правила эксплуатации (порядок использования по назначению)	5
10. Уход за изделием	5
11. Техническое обслуживание и текущий ремонт	5
12. Транспортирование и хранение	5
13. Порядок утилизации	6
14. Гарантийные обязательства	6
Приложение 1 (Инструкция по сборке)	7
Приложение 2 (Гарантийный талон)	8

1. Введение

Настоящие технические условия распространяются на Кушетку медицинскую ГР-КС по ТУ 32.50.30-008-58588802-2017 (далее – кушетка, изделие), предназначенную для размещения пациентов при проведении медицинских процедур в смотровых, процедурных и медицинских кабинетах.

Область применения - лечебно-профилактические учреждения широкого профиля.

2. Технические характеристики.

2.1 Габаритные размеры изделия приведены в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Наименование	Длина общая, ±2 мм	Длина подголовника, ±2 мм	Ширина, ±2 мм	Высота, ±2 мм
1	Кушетка медицинская ГР-КС по ТУ 32.50.30-008-58588802-2017	1890	510	580	530

2.2 Масса изделия приведена в таблице 2.

Таблица 2

№ п/п	Наименование	Масса, не более кг
1	Кушетка медицинская ГР-КС по ТУ 32.50.30-008-58588802-2017	24,2

2.3 Несущие конструкции кушетки (рамы, каркасы, основания) должны изготавливаться замкнутого сечения. Накладные, декоративные элементы кушетки закреплены неподвижно.

2.4. Кушетка должна характеризоваться жесткой и прочной конструкцией, удобной для эксплуатации в соответствии с ее назначением, и должна отвечать необходимым декоративным и эстетическим требованиям.

2.5. Все сварные швы должны быть непрерывными и сплошными, на видимой поверхности кушетки не допускаются дефекты сварных соединений.

2.6. Фурнитура, выходящая на поверхность изделий, должна быть без заусенцев.

2.7. Наружная поверхность кушетки не должна иметь вмятин, царапин, трещин, потертостей.

2.8. Кушетка в состоянии эксплуатации должна стоять на горизонтальной плоскости пола устойчиво, без раскачивания, при этом зазор между полом и ножками-опорами должен быть не более 3 мм.

2.9 Угол наклона подголовника кушетки должен устанавливаться: (0°; 19°; 22°; 29°)±1°.

2.10. Металлические ножки должны иметь пластмассовые насадки-заглушки.

2.11 Не должно быть обнаружено какой-либо остаточной деформации, могущей ухудшить эксплуатационные свойства кушетки и ее составных частей, после падения.

2.12. Максимально допустимая нагрузка должна быть не менее 200 кг.

2.13. Механическая прочность должна быть не менее 350 кг.

2.14. Толщина настила должна быть 14±1мм;

2.15. В изделиях, имеющих основание из древесных материалов, покровный и облицовочный материал, рекомендуется крепить скобами.

2.16. Для изделий в мягких элементах высотой до 50 мм облицовочный материал может быть плотно затянут по углам без прошивки.

Не допускаются швы на лицевой поверхности мягких элементов, кроме случаев, когда наличие швов обусловлено художественным решением изделия, что должно быть предусмотрено в технической документации.

2.17. Уровень напряженности электростатического поля на поверхности изделий в условиях эксплуатации (при влажности воздуха помещения 30%-60%) не должен превышать 15,0 кВ/м.

2.18 Допустимая удельная активность радионуклида цезия-137 в древесносодержащих материалах, используемых для изготовления изделий, не должна превышать 300 Бк/кг.

2.19 Для изготовления мягких элементов изделий не должны применяться легко воспламеняемые и относящиеся к группе Т4 по токсичности продуктов горения обивочные кожаные материалы.

2.20 Прочностные показатели изделий.

2.20.1 Устойчивость в направлении вперед и назад должна быть, не менее 15 даН.

2.20.2 Статическая прочность навесных боковин должна быть, не менее 80 даН.

2.20.3 Прочность ножек в поперечном и продольном направлениях должна быть, не менее 40 даН.

2.20.4 Ударная прочность сидений кушеток должна соответствовать ГОСТ 19120 при высоте падения груза 140 мм.

3. Требования к персоналу

3.1 Персонал лечебно-профилактического учреждения широкого профиля.

4. Назначение

4.1. для размещения пациентов при проведении медицинских процедур в смотровых, процедурных и медицинских кабинетах.

5. Противопоказания

5.1. Противопоказания отсутствуют.

6. Комплект поставки

6.1 Комплект поставки должен соответствовать указанному в таблице 3.

Таблица 3

№ п.п.	Наименование	Кол-во, шт.
Кушетка медицинская ГР-КС по ТУ 32.50.30-008-58588802-2017		
1	Кушетка медицинская ГР-КС по ТУ 32.50.30-008-58588802-2017, в составе:	
1.1	Ложe	1
1.2	Ножка	2
1.3	Болт мебельный М8х50	8
1.4	Гайка М8	8
2	Руководство по эксплуатации	1

7. Сборка кушетки.

7.1. Прежде чем приступить к сборке изделия, необходимо освободить все детали набора от упаковки, проверить комплектность пакетов и ознакомиться с инструкцией по

сборке. Сборку производить на ровном полу. Пол можно застелить тканью, пленкой или картоном во избежание повреждений и загрязнения изделия.

7.2. Инструкция по сборке приведена в приложении 1.

8. Предупреждения и предосторожности.

8.1 Используйте изделие только в соответствии с его функциональным назначением. Сохранность и долговечность кушетки зависит не только от ее качества, но и от условий эксплуатации. При транспортировке и хранении изделия в упаковке она должна быть надежно защищена от намокания, грязи, сильных толчков, ударов тяжелыми предметами, а также недопустимо падение с любой высоты.

9. Правила эксплуатации (порядок использования по назначению)

9.1. Не допускайте в помещении высоких и низких температур, а также резких перепадов температур.

9.2. Поверхности изделия должны быть всегда сухими. При попадании влаги на поверхность ее следует протереть впитывающим влагу материалом.

9.3. Не допускайте воздействия на изделие горячих, раскаленных предметов, а также продолжительного воздействия излучений, вызывающих перегревание (мощных ламп, ламп накаливания, микроволнового излучения).

9.4. Не допускайте воздействия на изделие агрессивных жидкостей (кислот, щелочей).

9.5. Не проводите по поверхности изделия и не ударяйте острыми или тяжелыми твердыми предметами.

9.6. Во избежание поломки кушетки не рекомендуется воздействие сильных вертикальных нагрузок на основание (прыгать, ходить, становиться ногами).

10. Уход за изделием.

10.1. Поверхность кушетки рекомендуется протирать слегка увлажненной водой мягкой тканью (фланель, сукно, плюш, миткаль).

10.2. Покрытие лакокрасочных покрытий производится увлажненной махровой или замшевой микроволокнистой салфеткой с использованием специальных полиролей для лакокрасочных покрытий. Допускается использование моющих средств (слабые мыльные растворы), а также слабого раствора этилового спирта.

10.3. Очистка кожаного заменителя производится поролоновой губкой либо мягкой тканью с применением слабого мыльного раствора. Для удаления грязи и жирных пятен рекомендуется применять специальные средства по уходу.

10.4. Категорически недопустимо при чистке изделия применение твердых приспособлений (скребков, губок) к рабочим поверхностям из металлического материала, а также агрессивных абразивных материалов и моющих средств на кислотной и щелочной основе.

10.5. Поверхность кушетки следует предохранять от попадания агрессивных жидкостей, особенно растворяющих лакокрасочные пленки (ацетон, бензин, спирт и др.). Случайно попавшую на поверхность жидкость следует немедленно снять сухой тканью.

10.6. Не допускается применение соды, порошков, паст, не предназначенных для ухода за изделием, а также средств, содержащих абразивные материалы и агрессивных жидкостей (кислоты, щелочи, масла) или их пары.

10.7. Рекомендуется как можно скорее очищать любую часть изделия от загрязнения. Если загрязнение остается на поверхности некоторое время, то это заметно повышает возможность образования разводов, пятен и повреждения.

11. Техническое обслуживание и текущий ремонт.

11.1. Техническое обслуживание, а также гарантийный и послегарантийный ремонт осуществляет производитель или уполномоченный (аккредитованный) представитель.

12. Транспортирование и хранение

12.1 Транспортирование изделий осуществляется всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с правилами, действующими на данном виде транспорта.

В пределах одного населенного пункта изделие допускается перевозить открытым автотранспортом при условии предохранения ее от повреждения, загрязнения и атмосферных осадков.

Размещение и крепление упакованных транспортируемых изделий должно осуществляться в положении, исключающем их повреждения друг о друга и о стенки транспортных средств.

12.2 Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

12.3 Готовую продукцию хранят в крытых помещениях, соответствующих в части воздействия климатических факторов условиям хранения 1 (Л) по ГОСТ 15150. Условия хранения должны исключать воздействие на продукцию влаги и агрессивных сред.

13. Порядок утилизации

13.1 Утилизация изделий должна осуществляться в соответствии правилами сбора, учёта и утилизации, установленными уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, а также СанПиН 2.1.3684-21. Запрещено выбрасывать как бытовой мусор.

13.2 Согласно СанПиН 2.1.3684-21 кушетка относится к классу А – эпидемиологические безопасные отходы.

14. Гарантийные обязательства.


14.1 Гарантийный срок хранения – 2 года со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня продажи.

14.2 проект гарантийного талона представлен в Приложении 2.

Приложение 1

Инструкция по сборке.

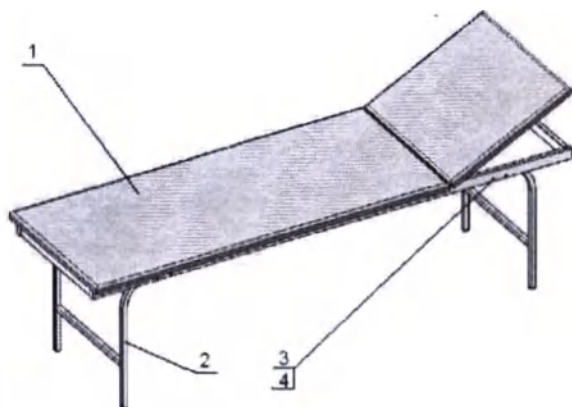

1. Присоединить ножки (поз.2) к ложу (поз.1) при помощи 8-и болтов М8х50 (поз.3) и 8-и гаек М8 (поз.4). Болты устанавливаются шляпкой с внешней стороны металл-каркаса ложа.
 2. Протянуть все соединения при помощи ключа на «13».
 3. Поднять подголовник в нужное положение.
- Максимально допустимая нагрузка должна быть: не более 200 кг

Приложение 2



медицинский инструментарий

НПКЦ МИЗ

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «НПКЦ «МИЗ»

_____ А.А. Листков

«__» _____ 2022 г.

Гарантийный талон
(проект)

Медицинское изделие

Кушетка медицинская ГР-КС по ТУ 32.50.30-008-58588802-2017

Регистрационное удостоверение № _____

Модель _____

Адрес, телефон покупателя _____

Номер партии _____

Производитель: ООО «НПКЦ «МИЗ» Официальный представитель _____

печать

Дата изготовления _____

Дата продажи _____

Продавец _____

Дата продажи _____

Покупатель _____

Представитель продавца _____

подпись

Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 18 месяцев со дня продажи при соблюдении условий транспортирования и хранения. Продавец обязуется провести бесплатную замену изделия в период гарантийного срока при условии соблюдения Покупателем условий хранения, транспортировки. Организация, уполномоченная изготовителем на принятие и удовлетворение требований потребителей в отношении товаров ненадлежащего качества: ООО «НПКЦ «МИЗ», 603087, Нижегородская обл., г. Н. Новгород, Слобода Александровская, д. 241, телефон: +7 (831) 212-44-33.

Прошито и скреплено печатью

8 (восемь) листов(-а)

Директор ООО «НПКЦ «МИЗ»

_____ А. А. Листков

