

109028 г. Москва, Тессинский переулок, д. 5 стр.

1, этаж 4, пом.2 ком.5

тел. /495/ 221-40-87

Московский банк Сбербанка России г. Москва, р.с.40702810338250035468

к.с. 301 018 104 000 000 002 25 БИК 044525225

ООО «АМС-Мед»

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «АМС-Мед»



В.А. Махаев

«31»

2020 г.

Кружка Эсмарха «АМС-Мед»

по

ТУ 9398-001-84148676-2015

Руководство по эксплуатации

2020 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1.	НАЗНАЧЕНИЕ	3
2.	ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ	3
3.	ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ	3
4.	ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ	3
5.	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ	3
5.1.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
5.2.	ПОРЯДОК РАБОТЫ С ИЗДЕЛИЕМ	3
6.	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	4
7.	УТИЛИЗАЦИЯ И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	8
8.	ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ	9
9.	КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	9
10.	МАРКИРОВКА	9
11.	ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	10
12.	ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ	10
13.	ПРИЛОЖЕНИЕ 1: ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ КРУЖЕК ЭСМАРХА	

ВНИМАНИЕ!!!

**ПЕРЕД ТЕМ КАК ПРИСТУПИТЬ К ЭКСПЛУАТАЦИИ, ВНИМАТЕЛЬНО
ОЗНАКОМЬТЕСЬ С НАСТОЯЩИМ РУКОВОДСТВОМ**

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Настоящее руководство распространяется на Кружку Эсмарха «АМС-Мед» по ТУ 9398-001-84148676-2015 (далее по тексту – кружка, изделие, изделия), предназначенную для проведения лечебных или очистительных клизм; спринцеваний и орошений влагалища.

Область применения - лечебно-профилактические учреждения широкого профиля, а так же домашние условия.

Кружка Эсмарха выпускается в следующих исполнениях: (см. Приложение 1).

2. ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- запоры;
- необходимость ректального введения лечебных растворов;
- подготовка к эндоскопическому обследованию.

3. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- рак прямой кишки;
- болезнь Крона (хроническое воспалительное заболевание желудочно-кишечного тракта);
- наличие в желудочно-кишечном тракте ран различной этимологии;
- острые воспалительные или эрозивно-язвенные поражения слизистой оболочки кишечника;
- острый аппендицит;
- острый перитонит;
- желудочно-кишечные кровотечения;
- тяжелая сердечнососудистая недостаточность;
- острые воспалительные процессы половых органов;
- месячные;
- беременность;
- первые недели после родов;
- первые недели после аборта или операций.

4. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ

Нет

5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

5.1 Общие положения

После транспортирования в условиях отрицательных температур изделия в транспортной таре должны быть выдержаны в нормальных климатических условиях не менее 12 часов.

Перед эксплуатацией изделия следует ознакомиться с принципом действия и правилами эксплуатации, требованиями изготовителя предъявляемые к эксплуатации изделий.

5.2 Порядок работы с изделием

- надеть перчатки;
- кружку извлечь из индивидуальной упаковки;
- вставить наконечник в трубку кружки (для исполнений имеющих маркировку «Т1» в составе артикула);
- после перекрытия трубки с помощью зажима, заполнить мешок-емкость необходимым количеством вводимого раствора;
- удалить воздух из системы, вновь перекрыть подачу раствора зажимом;
- горловину мешка плотно закрыть крышкой (для исполнений имеющих маркировку «КК» в составе артикула);

5.2.1 Использование для очистительных и лечебных клизм

- трубку взять в правую руку в области дистального конца и смазать вазелином;
- кружку Эсмарха поднять на высоту 1-1,5 м от уровня пола;
- уложить пациента на левый бок, ноги согнуть в коленях и слегка привести к животу;

- осторожно ввести дистальный конец трубки в прямую кишку на глубину 8-12см, выполняя аккуратные вращательные движения;
- после открытия зажима ввести необходимое количество раствора;
- оставив на дне мешка немного раствора, чтобы в кишечник не попал воздух, закрыть зажим, регулирующий поступление жидкости;
- по окончании манипуляции дистальный конец трубки извлечь из прямой кишки через салфетку, смоченную в дезрастворе;
- область заднего прохода протереть чистой салфеткой.

ВНИМАНИЕ: При наличии газов и появлении у больного чувства распирания в области живота необходимо опустить кружку Эсмарха ниже уровня наконечника и после отхождения газов снова постепенно поднять ее. При постановке очистительной клизмы нужно следить, чтобы одномоментно вводилось не более 1,5-2 л жидкости.

5.2.2 Использование для спринцевания и орошения влагалища.

- процедуру выполняют в положении лежа, ноги должны быть согнуты в коленях, под таз ставят судно;
- трубку взять в правую руку в области дистального конца;
- кружку Эсмарха поднять на такую высоту, чтобы она на 75 см была выше судна;
- дистальный конец крайне аккуратно вводят во влагалище на глубину 5-7 см, раздвигая рукой наружные половые губы (вход во влагалище предварительно обрабатывают вазелином);
- после открытия зажима ввести необходимое количество раствора, вначале струя должна быть совсем слабой, иначе может произойти спазм сосудов;
- по окончании манипуляции наконечник извлекают из влагалища через салфетку, смоченную в дезрастворе;
- область промежности протереть чистой салфеткой.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.

Не использовать изделие при поврежденной упаковке.

Повторное использование данного изделия, предназначенного для однократного применения, может представлять риск для пользователя. Повторная обработка, очистка, дезинфекция могут ухудшить технические характеристики изделия, что в свою очередь создает риск нанесения телесных повреждений или инфицирования пациента. Следите за сроком годности изделия. Не используйте кружки Эсмарха с истекшим сроком годности.

6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

6.1 Основные параметры и характеристики

6.1.1 Кружка Эсмарха исполнения имеющих маркировку «КК****Т2» в составе артикула, представляет собой пластиковую емкость, оснащенную гибкой отводной трубкой с атравматичным концом, крышкой и зажимом, контролирующим скорость введения жидкости. Кружка Эсмарха стерилизована оксидом этилена.

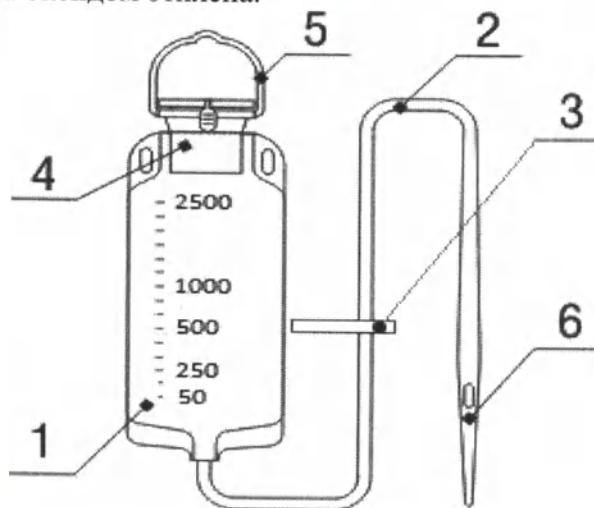


Рисунок 1 – Кружка Эсмарха исполнения «КК****Т2»

1. Градуировка. 2. Трубка. 3. Зажим. 4. Крышка. 5. Петля для подвешивания. 6. Атравматичный конец трубки.

6.1.2 Кружка Эсмарха исполнения имеющих маркировку «КК***Т1» в составе артикула представляет собой пластиковую емкость, оснащенную гибкой отводной трубкой с концом под наконечник, крышкой и зажимом, контролирующим скорость введения жидкости. Кружка Эсмарха стерилизована оксидом этилена.

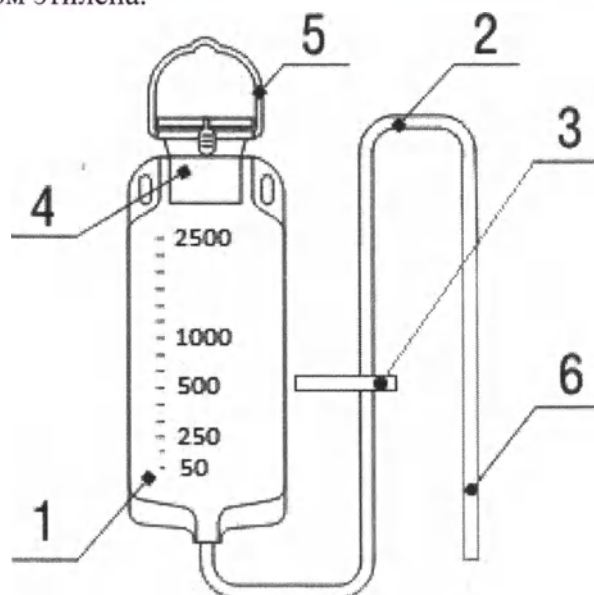


Рисунок 2 – Кружка Эсмарха исполнения «КК***Т1»

1. Градуировка. 2. Трубка. 3. Зажим. 4. Крышка. 5. Петля для подвешивания. 6. Конец трубки под наконечник.

6.1.3 Кружка Эсмарха исполнения имеющих маркировку «К***Т2» в составе артикула; представляет собой пластиковую емкость, оснащенную гибкой отводной трубкой с атравматичным концом, антирефлюксным клапаном и зажимом, контролирующим скорость введения жидкости. Кружка Эсмарха стерилизована оксидом этилена.

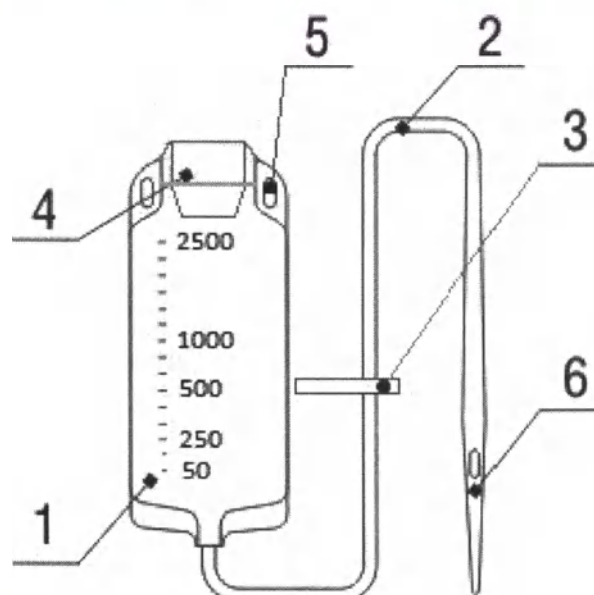


Рисунок 3 - Кружка Эсмарха исполнения «К***Т2»

1. Градуировка. 2. Трубка. 3. Зажим. 4. Антирефлюксный клапан. 5. Отверстие для подвешивания. 6. Атравматичный конец трубки.

6.1.4 Кружка Эсмарха исполнения имеющих маркировку «К***Т1» в составе артикула представляет собой пластиковую емкость, оснащенную гибкой отводной трубкой с концом под наконечник, антирефлюксным клапаном и зажимом, контролирующим скорость введения жидкости. Кружка Эсмарха стерилизована оксидом этилена.

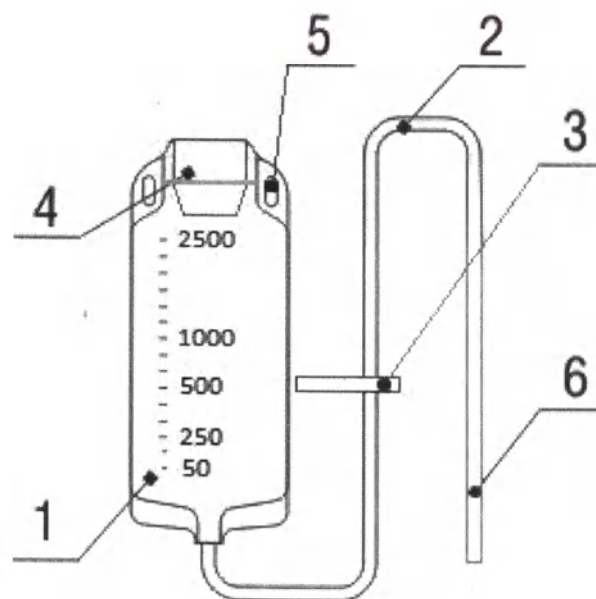


Рисунок 4 - Кружка Эсмарха исполнения «K***T1»

1. Градуировка. 2. Трубка. 3. Зажим. 4. Антирефлюксный клапан. 5. Отверстие для подвешивания. 6. Конец трубки под наконечник.

6.1.5 Кружка Эсмарха исполнения имеющих маркировку «KK***T1K» в составе артикула представляет собой пластиковую емкость, оснащенную гибкой отводной трубкой с концом под наконечник, крышкой и крестообразным краном, контролирующим скорость введения жидкости. Кружка Эсмарха стерилизована оксидом этилена.

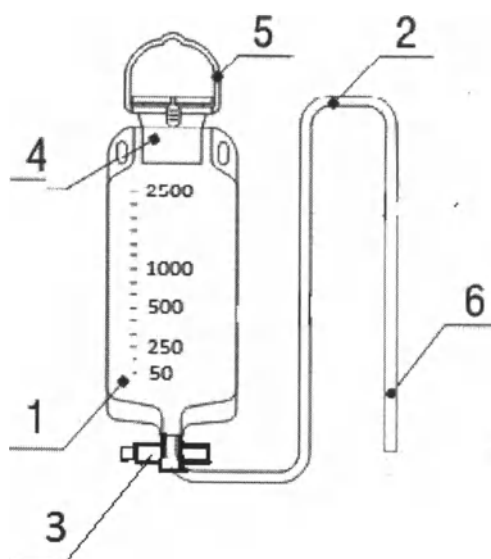


Рисунок 5 - Кружка Эсмарха исполнения «KK***T1K»

1. Градуировка. 2. Трубка. 3. Крестообразный кран. 4. Крышка. 5. Отверстие для подвешивания. 6. Конец трубки под наконечник.

6.1.6 Кружка Эсмарха исполнений имеющих маркировку «К***Т1К» в составе артикула представляет собой пластиковую емкость, оснащенную гибкой отводной трубкой с концом под наконечник, антирефлюксным клапаном и крестообразным краном, контролирующим скорость введения жидкости. Кружка Эсмарха стерилизована оксидом этилена.

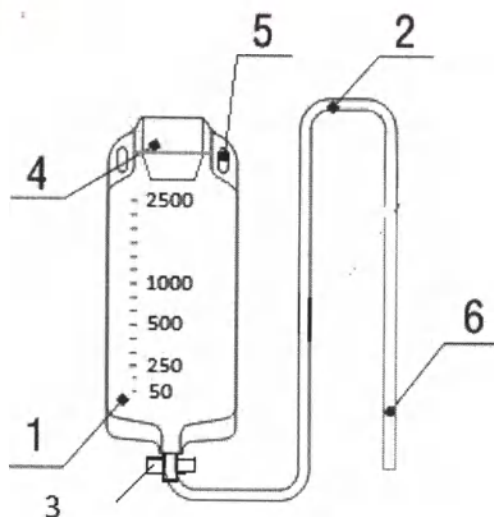


Рисунок 6 - Кружка Эсмарха исполнений «КК***Т1К»

1. Градуировка. 2. Трубка. 3. Крестообразный кран. 4. Антирефлюксный клапан. 5. Отверстие для подвешивания. 6. Конеч трубки под наконечник.

6.1.7 Кружка Эсмарха исполнений имеющих маркировку «КК***Т2К» в составе артикула представляет собой пластиковую емкость, оснащенную гибкой отводной трубкой с атравматичным концом, антирефлюксным клапаном и крестообразным краном, контролирующим скорость введения жидкости. Кружка Эсмарха стерилизована оксидом этилена.

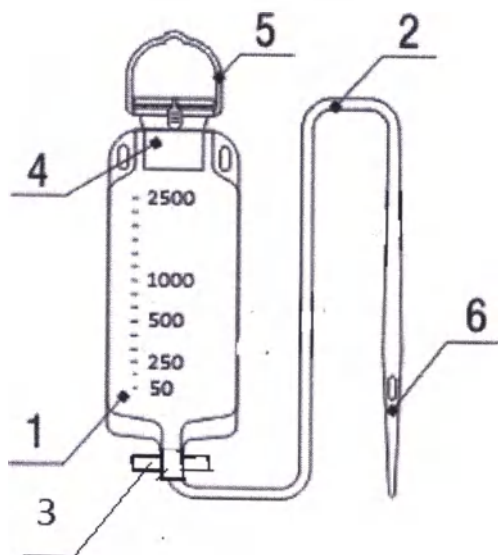


Рисунок 7 - Кружка Эсмарха исполнений «КК***Т2К»

1. Градуировка. 2. Трубка. 3. Крестообразный кран. 4. Крышка. 5. Отверстие для подвешивания. 6. Атравматичный конец трубки

6.1.8 Кружка Эсмарха исполнений имеющих маркировку «К***Т2К» в составе артикула представляет собой пластиковую емкость, оснащенную гибкой отводной трубкой с атравматичным концом, антирефлюксным клапаном и крестообразным краном, контролирующим скорость введения жидкости. Кружка Эсмарха стерилизована оксидом этилена.

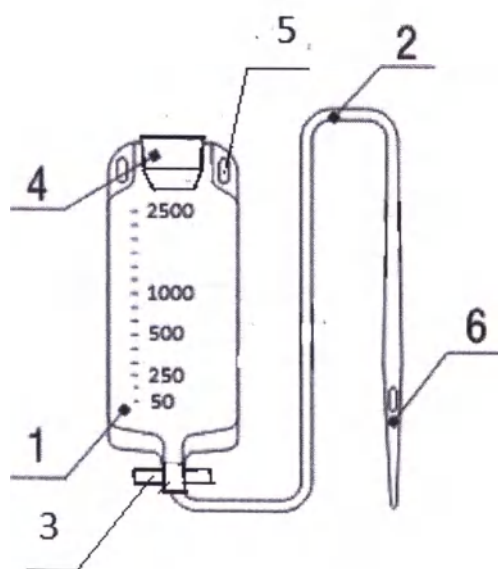


Рисунок 8 - Кружка Эсмарха исполнений «К***Т2К»

1. Градуировка. 2. Трубка. 3. Крестообразный кран. 4. Антирефлюксный клапан.
5. Отверстие для подвешивания. 6. Атравматичный конец трубки

6.2. Емкость кружки Эсмарха должна соответствовать таблице 1.

Таблица 1

№	Обозначение ёмкости в составе артикула	Емкость, +50мл
1	«1000»	1000
2	«1500»	1500
3	«1750»	1750
4	«2000»	2000
5	«2500»	2500

Длина трубки кружки Эсмарха исполнений имеющих в составе артикула обозначение «Т1»

1 300±20 мм.

Длина трубки кружки Эсмарха исполнений имеющих в составе артикула обозначение «Т2»

1 500±20 мм.

Внутренний диаметр трубки кружки Эсмарха исполнений имеющих в составе артикула обозначение «Т1» - 7,0±1 мм.

Внутренний диаметр трубки кружки Эсмарха исполнений имеющих в составе артикула обозначение «Т2» - 5,0±1 мм.

6.3. Изделия изготавливаются из материалов, приведенных в таблице 2.

Таблица 2

№	Наименование	Используемый материал
1	Мешок	Поливинилхлорид марки С-7059-М
2	Трубка	Поливинилхлорид марки С-7059-М
3	Крышка	Поливинилхлорид марки С-7059-М
4	Зажим	Полистирол марки Н1-121Н
5	Наконечник Н1	Поливинилхлорид марки С-7059-М
6	Наконечник Н2	Полипропилен марки Бален 01250
7	Крестообразный кран	Корпус- полипропилен марки Yuplene R370Y, шток - полиэтилен марки DMDA-8008

6.4. Наконечники изготавливаются анатомической формы, они безопасны и атравматичны благодаря мягкому материалу и отсутствию острых граней.

6.5. На мешке нанесена градуировка от 50 мл, цена деления 100 мл.

6.6. Толщина стенки мешка должна быть $0,15 \pm 0,01$ мм.

6.7. Кружки Эсмарха имеющие в маркировке символ «K2***» имеют мешок с боковой шкалой, полученной горячим тиснением.

6.8. Кружки Эсмарха имеющие в маркировке символ «Г» имеют трубку со шкалой до 14 см.

7. УТИЛИЗАЦИЯ И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

7.1 Кружка Эсмарха должна быть собрана и передана специальным лицензированным организациям, занимающимися утилизацией медицинских отходов. Утилизация должна производиться в соответствии с нормами и требованиями, действующими на территории РФ.

7.2 Согласно СанПиН 2.1.7.2790 кружка относится к классу А – эпидемиологические безопасные отходы.

8. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

8.1 Упакованные изделия могут перевозиться любым видом транспорта при условии защиты от атмосферных осадков и соблюдения мер предосторожности и правил перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта.

8.2 Размещение и крепление коробок с изделиями в транспортных средствах должно обеспечивать их устойчивое положение, исключая возможность смещения коробок и ударов их друг о друга и о стенки транспортных средств.

8.3 При транспортировании изделия должны быть устойчивы к климатическим воздействиям по ГОСТ Р 15150 для условий хранения 5.

8.4 Изделия хранят в упакованном виде в помещениях, при температуре от плюс 5 до плюс 35 °С.

Изделия должны храниться в сухих проветриваемых помещениях на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов и должны быть защищены от солнечных лучей и атмосферных воздействий.

9. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

№	Наименование	Количество, шт.
1	Кружка Эсмарха «АМС-Мед» по ТУ 9398-001-84148676-2015*	1
2	Руководство по эксплуатации	1

*- исполнение выбирается Заказчиком из числа представленных: см. приложение 1.

10. МАРКИРОВКА

10.1 Символы, используемые для маркировки.

- номер партии
- символ «Не использовать повторно»
- символ «Не стерилизовать повторно»
- символ «Осторожно! Обратитесь к сопроводительной документации»
- символ «Не выбрасывать! Сдать в специальный пункт по утилизации»
- символ «Беречь от влаги»
- символ «Не допускать воздействия солнечного света»
- символ «Температурный диапазон»
- символ «Использовать до ...»
- символ «Дата изготовления»
- символ «Стерилизация с применением окиси этилена»
- символ «Этот продукт не содержит натуральный латекс»
- символ «Знак соответствия при декларировании соответствия»


 (номер)



(год/месяц)



(год/месяц)

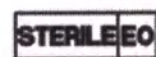

11. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

11.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям настоящего ТУ при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

11.2 Изготовитель гарантирует стерильность мочеприемников, а также всех их параметров и характеристик, заявленных в настоящем документе, в течение всего срока годности (5 лет) при условии сохранения целостности индивидуальной упаковки и соблюдения условий хранения, транспортировки и использования в соответствии инструкцией по применению.

12. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

ООО «АМС-Мед»

Юридический адрес: 109028 г. Москва. Тессинский переулок, д5. Стр. 1, этаж 4, помещение 2, комната 5.

Адрес производства: Московская обл. г. Луховицы, ул. Куйбышева д.9 а.

Вариант исполнения	Комплект	Емкость не более /мл	Габаритные размеры мешка/мм В×Ш (±2 мм)	Длина трубки/мм (±20 мм)	Вес не более/гр	Масса зажима не более /гр	Внутренний диаметр трубки кружки Эсмарха/мм (мм±1 мм)
K-1000-T1	Мешок с клапаном(вид 1), с трубкой, Зажим, Наконечники Н1,или Н2	1100	340×136	1300	80	3,0	7,0
K-1500-T1	Мешок с клапаном (вид1) трубкой, Зажим, Наконечники Н1,или Н2,	1800	340×180	1300	90	3,0	7,0
K-1750-T1	Мешок с клапаном (вид 1), с трубкой, Зажим, Наконечники Н1,или Н2,	1800	340×180	1300	90	3,0	7,0
K-2000-T1	Мешок с клапаном (вид 1),с трубкой, Зажим, Наконечники Н1,или Н2	2200	340×200	1300	95	3,0	7,0
K-2500-T1	Мешок с клапаном (вид 1), с трубкой, Зажим, Наконечники Н1,или Н2,	2700	340×214	1300	95	3,0	7,0
K-1000-T1K	Мешок с клапаном (вид 1), с трубкой, крестообразный кран, Наконечники Н1,или Н2,	1100	340×136	1300	80	3,0	7,0
K-1500-T1K	Мешок с клапаном (вид 1), с трубкой, крестообразный кран, Наконечники Н1,или Н2,	1800	340×180	1300	90	3,0	7,0
K-1750-T1K	Мешок с клапаном (вид 1), с трубкой, крестообразный кран, Наконечники Н1,или Н2,	1800	340×180	1300	90	3,0	7,0
K-2000-T1K	Мешок с клапаном (вид 1), с трубкой, крестообразный кран, Наконечники Н1,или Н2,	2200	340×200	1300	95	3,0	7,0
K-2500-T1K	Мешок с клапаном (вид 1), с трубкой, крестообразный кран, Наконечники Н1,или Н2,	2700	340×214	1300	95	3,0	7,0
K2-1000-T1	Мешок с клапаном(вид 2), с трубкой, Зажим, Наконечники Н1,или Н2,	1100	340×136	1300	80	3,0	7,0
K2-1500-T1	Мешок с клапаном (вид 2), с трубкой, Зажим, Наконечники Н1,или Н2	1800	340×165	1300	90	3,0	7,0
K2-1750-T1	Мешок с клапаном (вид 2), с трубкой, Зажим, Наконечники Н1,или Н2	1800	340×180	1300	90	3,0	7,0
K2-2000-T1	Мешок с клапаном(вид 2), с трубкой, Зажим, Наконечники Н1,или Н2,	2200	340×200	1300	95	3,0	7,0
K2-2500-T1	Мешок с клапаном(вид 2), с трубкой, Зажим, Наконечники Н1,или Н2,	2700	340×250	1300	95	3,0	7,0
K2-1000-T1K	Мешок с клапаном(вид 2), с трубкой, Крестообразный кран, Наконечники Н1,или Н2,	1100	340×136	1300	80	3,0	7,0
K2-1500-T1K	Мешок с клапаном(вид 2), с трубкой, Крестообразный кран, Наконечники Н1,или Н2,	1800	340×165	1300	90	3,0	7,0
K2-1750-T1K	Мешок с клапаном(вид 2), с трубкой, Крестообразный кран, Наконечники Н1,или Н2,	1800	340×180	1300	90	3,0	7,0
K2-2000-T1K	Мешок с клапаном(вид 2), с трубкой, Крестообразный кран, Наконечники Н1,или Н2,	2200	340×200	1300	95	3,0	7,0
K2-2500-T1K	Мешок с клапаном(вид 2), с трубкой, Крестообразный кран, Наконечники Н1,или Н2,	2700	340×250	1300	95	3,0	7,0
K-1000-T2	Мешок склапаном (вид 1), с трубкой с атравматичным концом, зажим	1100	340×136	1500	65	3,0	5,0
K-1500-T2	Мешок склапаном (вид 1), с трубкой с атравматичным концом, зажим	1800	340×180	1500	70	3,0	5,0
K-1750-T2	Мешок склапаном (вид 1), с трубкой с атравматичным концом, зажим	1800	340×180	1500	70	3,0	5,0
K-2000-T2	Мешок склапаном (вид 1), с трубкой с атравматичным концом, зажим	2200	340×200	1500	75	3,0	5,0
K-2500-T2	Мешок склапаном (вид 1), с трубкой с атравматичным концом, зажим	2700	340×214	1500	75	3,0	5,0
K2-1000-T2	Мешок склапаном (вид 2), с трубкой с атравматичным концом, зажим	1100	340×136	1500	65	3,0	5,0
K2-1500-T2	Мешок склапаном (вид 2), с трубкой с атравматичным концом, зажим	1800	340×165	1500	70	3,0	5,0
K2-1750-T2	Мешок склапаном (вид 2), с трубкой с атравматичным концом, зажим	1800	340×180	1500	70	3,0	5,0
K2-2000-T2	Мешок склапаном (вид 2), с трубкой с атравматичным концом, зажим	2200	340×200	1500	75	3,0	5,0
K2-2500-T2	Мешок склапаном (вид 2), с трубкой с атравматичным концом, зажим	2700	340×250	1500	75	3,0	5,0
K-1000-T2Г	Мешок склапаном (вид 1), с трубкой с атравматичным концом с градуировкой, зажим	1100	340×136	1500	65	3,0	5,0

 **ООО ЦИПМИ**  **INFO@CIRMI.RU**  **WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU**

	крестообразный кран						
К2-2500-Т2 ГК	Мешок складаном (вид 2), с трубкой с атравматичным концом с градуировкой, крестообразный кран	2700	340×250	1500	80	3,0	5,0
КК-1000-Т1	Мешок с крышкой и трубкой, Зажим, Наконечники Н1, или Н2,	1100	340×136	1300	110	3,0	7,0
КК-1500-Т1	Мешок с крышкой и трубкой, Зажим, Наконечники Н1, или Н2,	1800	340×180	1300	120	3,0	7,0
КК-1750-Т1	Мешок с крышкой и трубкой, Зажим, Наконечники Н1, или Н2,	1800	340×180	1300	120	3,0	7,0
КК-2000-Т1	Мешок с крышкой и трубкой, Зажим, Наконечники Н1, или Н2,	2200	340×200	1300	125	3,0	7,0
КК-2500-Т1	Мешок с крышкой и трубкой, Зажим, Наконечники Н1, или Н2,	2700	340×200	1300	125	3,0	7,0
КК-1000-Т1К	Мешок с крышкой и трубкой, Крестообразный кран, Наконечники Н1, или Н2,	1100	340×136	1300	110	3,0	7,0
КК-1500-Т1К	Мешок с крышкой и трубкой, Крестообразный кран, Наконечники Н1, или Н2,	1800	340×180	1300	120	3,0	7,0
КК-1750-Т1К	Мешок с крышкой и трубкой, Крестообразный кран, Наконечники Н1, или Н2,	1800	340×180	1300	120	3,0	7,0
КК-2000-Т1К	Мешок с крышкой и трубкой, Крестообразный кран, Наконечники Н1, или Н2,	2200	340×200	1300	125	3,0	7,0
КК-2500-Т1К	Мешок с крышкой и трубкой, Крестообразный кран, Наконечники Н1, или Н2,						
КК2-1000-Т1	Мешок с крышкой (вид 2) и трубкой, Зажим, Наконечники Н1, или Н2,	1100	340×136	1300	110	3,0	7,0
КК2-1500-Т1	Мешок с крышкой (вид 2) и трубкой, Зажим, Наконечники Н1, или Н2,	1800	340×165	1300	120	3,0	7,0
КК2-1750-Т1	Мешок с крышкой (вид 2) и трубкой, Зажим, Наконечники Н1, или Н2,	1800	340×180	1300	120	3,0	7,0
КК2-2000-Т1	Мешок с крышкой (вид 2) и трубкой, Зажим, Наконечники Н1, или Н2,	2200	340×200	1300	125	3,0	7,0
КК2-2500-Т1	Мешок с крышкой (вид 2) и трубкой, Зажим, Наконечники Н1, или Н2,	2700	340×250	1300	125	3,0	7,0
КК2-1000-Т1К	Мешок с крышкой (вид 2) и трубкой, Крестообразный кран, Наконечники Н1, или Н2,	1100	340×136	1300	110	3,0	7,0
КК2-1500-Т1К	Мешок с крышкой (вид 2) и трубкой, Крестообразный кран, Наконечники Н1, или Н2,	1800	340×165	1300	120	3,0	7,0
КК2-1750Т1К	Мешок с крышкой (вид 2) и трубкой, Крестообразный кран, Наконечники Н1, или Н2,	1800	340×180	1300	120	3,0	7,0
КК2-2000-Т1К	Мешок с крышкой (вид 2) и трубкой, Крестообразный кран, Наконечники Н1, или Н2,	2200	340×200	1300	125	3,0	7,0
КК2-2500-Т1К	Мешок с крышкой (вид 2) и трубкой, Крестообразный кран, Наконечники Н1, или Н2,	2700	340×250	1300	125	3,0	7,0
КК-1000-Т2	Мешок с крышкой и трубкой с атравматичным концом, Зажим	1100	340×136	1500	95	3,0	5,0
КК-1500-Т2	Мешок с крышкой и трубкой с атравматичным концом, Зажим	1800	340×180	1500	100	3,0	5,0
КК-1750-Т2	Мешок с крышкой и трубкой с атравматичным концом, Зажим	1800	340×180	1500	100	3,0	5,0
КК-2000-Т2	Мешок с крышкой и трубкой с атравматичным концом, Зажим	2200	340×200	1500	105	3,0	5,0
КК-2500-Т2	Мешок с крышкой и трубкой с атравматичным концом, Зажим	2700	340×214	1500	105	3,0	5,0
КК2-1000-Т2	Мешок с крышкой (вид 2) и трубкой с атравматичным концом, Зажим	1100	340×136	1500	95	3,0	5,0
КК2-1500-Т2	Мешок с крышкой (вид 2) и трубкой с атравматичным концом, Зажим	1800	340×165	1500	100	3,0	5,0
КК2-1750-Т2	Мешок с крышкой (вид 2) и трубкой с атравматичным концом, Зажим	1800	340×180	1500	100	3,0	5,0
КК2-2000-Т2	Мешок с крышкой (вид 2) и трубкой с атравматичным концом, Зажим	2200	340×200	1500	105	3,0	5,0
КК2-2500-Т2	Мешок с крышкой (вид 2) и трубкой с атравматичным концом, Зажим	2700	340×250	1500	105	3,0	5,0
КК-1000-Т2Г	Мешок с крышкой и трубкой с атравматичным концом с градуировкой, Зажим	1100	340×136	1500	95	3,0	5,0
КК-1500-Т2Г	Мешок с крышкой и трубкой с атравматичным концом с градуировкой, Зажим	1800	340×180	1500	100	3,0	5,0
КК-1750-Т2Г	Мешок с крышкой и трубкой с атравматичным концом с градуировкой,	1800	340×180	1500	100	3,0	5,0

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью _____ листов
Подпись _____

