


УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «Альцстор»

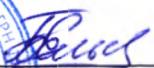

 Е.С. Бельская
«06» сентября 2021 год

Фиксатор для ограничения подвижности пациента АльцФикСТМ
по ТУ 32.50.50-004-17241647-2021

Инструкция по применению
(выпущена впервые)

2021

Настоящая инструкция по применению предназначена для ознакомления с медицинским изделием «Фиксатор для ограничения подвижности пациента АльцФикСТМ по ТУ 32.50.50-004-17241647-2021 (далее по тексту – фиксатор) поставляемым как отдельными изделиями, так и в комплектах (см. Приложение к инструкции)

Назначение и область применения

Фиксатор предназначен для временного размещения на одной или нескольких частях тела для ограничения движений пациента с целью обеспечения его надлежащего позиционирования и стабилизации во время проведения медицинской процедуры и/или предотвращения травм/потенциальных опасностей, при этом изделие позволяет немного двигаться и закрепляется на каком-либо приспособлении или предмете мебели (например, поручне кровати, операционном столе, каталке или инвалидном кресле).

Потенциальные потребители – взрослые и дети.

Область применения – медицинские лечебно-профилактические учреждения, а так же в домашних условиях.

Фиксатор выпускается не стерильным (стерилизации не подлежит) и является изделием многоразового использования.

Показания для применения

Для временного размещения на одной или нескольких частях тела для ограничения движений пациента с целью обеспечения его надлежащего позиционирования и стабилизации во время проведения медицинской процедуры и/или предотвращения травм/потенциальных опасностей, при этом изделие закрепляется на каком-либо приспособлении или предмете мебели (например, поручне кровати, операционном столе, каталке или инвалидном кресле)

Противопоказания для применения

- ЗАПРЕЩЕНО пользоваться изделием при наличии вывихов, переломов или повреждений кожных покровов на фиксируемой части тела;
- ЗАПРЕЩЕНО пользоваться изделием при наличии остеопороза;
- ЗАПРЕЩЕНО пользоваться изделием при наличии индивидуальной непереносимости материалов, из которых изготовлено изделие.

Меры предосторожности:

- не затягивать вплотную, фиксатор должен отставать от части тела на которую накладывается на толщину одного пальца;
- с осторожностью использовать при нестабильном психическом состоянии пациента.

Возможные побочные действия при использовании

При правильном хранении, транспортировании и использовании согласно данной инструкции – побочные действия отсутствуют. Возможны аллергические реакции при наличии индивидуальной непереносимости материалов, из которых изготовлено изделие.

Меры предосторожности при применении

Хранить в местах, недоступных для детей.

Порядок применения изделия

1. Фиксатор-вязка для взрослых

Манжету фиксатора для руки или ноги обернуть вокруг запястья* или щиколотки**. Узкий конец манжеты продеть в прорезь у основания и затянуть под размер запястья или щиколотки пациента. Манжету фиксатора для торса наложить поверх туловища. Закрепить на каком-либо приспособлении или предмете мебели с помощью длинных строп в произвольном порядке. Для снятия фиксатора, повторить действия в обратном порядке.

Справочно: * диапазон обхвата от 120мм до 220мм;

** диапазон обхвата от 140мм до 260мм.

2. Фиксатор мягкий для взрослых с застежкой «фастекс» или застежкой «рамка»

Манжету фиксатора для руки или ноги обернуть вокруг запястья* или щиколотки**, закрепить манжету на липучку и зафиксировать застежкой «фастекс» или «рамка». Манжету фиксатора для грудины или бедра наложить поверх туловища. Закрепить на каком-либо приспособлении или предмете мебели посредством петель из строп, застегивающихся на застежку «фастекс» или «рамку». Длина регулируется. Для снятия фиксатора, повторить действия в обратном порядке.

Справочно: * диапазон обхвата от 150мм до 220мм;

** диапазон обхвата от 200мм до 290мм.

3. Фиксатор-аэро для взрослых

Манжету фиксатора для руки или ноги обернуть вокруг запястья* или щиколотки**, закрепить манжету на липучку и зафиксировать застежкой «фастекс». Манжету фиксатора для грудины или бедра наложить поверх туловища. Закрепить на каком-либо приспособлении или предмете мебели посредством петель из строп, застегивающихся на застежку «фастекс». Длина регулируется. Для снятия фиксатора, повторить действия в обратном порядке.

Справочно: * диапазон обхвата от 120мм до 270мм;

** диапазон обхвата от 150мм до 300мм.

4. Фиксатор для взрослых для жесткой фиксации

Основу фиксатора для рук или ног положить на ширину кровати. Зафиксировать запястья* или щиколотки** в прикрепленные манжеты. Закрепить манжету на липучку и пряжки. Манжета фиксатора для торса наложить поверх туловища. Закрепить к раме кровати с помощью пряжек. Для снятия фиксатора, повторить действия в обратном порядке.

Справочно: * диапазон обхвата от 140мм до 280мм;

** диапазон обхвата от 190мм до 340мм.

5. Фиксатор узкий/широкий для пассивной фиксации универсальный

Метод 1. Соединить конечности вместе, обернуть фиксатором, закрепить липучку.

Метод 2. Соединить конечности вместе, подвести, например, к поручню, обернуть фиксатор вокруг конечности вместе с поручнем, закрепить липучку. Для снятия фиксатора, повторить действия в обратном порядке.

6. Фиксатор перчатки для взрослых

Просунуть кисть внутрь перчатки, проследить, чтобы каждый палец попал в отдельный отсек. Закрепить на запястье* липучку на манжете и застегнуть застежку «фастекс». Для снятия фиксатора, повторить действия в обратном порядке.

Справочно: * диапазон обхвата от 170мм до 280мм

7. Фиксатор варежка для взрослых

Просунуть кисть внутрь варежки. Закрепить на запястье* липучку на манжете и застегнуть застежку «фастекс». При необходимости закрепить на каком-либо приспособлении или

предмете мебели посредством дополнительной стропы, застегивающейся на застежку «фастекс». Для снятия фиксатора, повторить действия в обратном порядке.

Справочно: * диапазон обхвата от 160мм до 260мм

8. Фиксатор пояса* для взрослых для инвалидной коляски;

Фиксатор пояса* для взрослых с паховой вставкой для инвалидной коляски

При использовании пояса с паховой вставкой расположить пояс на коляске таким образом, чтобы вставка лежала на сиденье, а деталь пояса осталась спереди. При использовании пояса без вставки пропустить данный шаг. Посадить пациента в кресло-коляску. Обернуть пояс спереди по талии пациента и протянуть боковые стропы через прорези коляски назад**. Со стороны спинки коляски застегнуть стропы пояса и отрегулировать по размерам пациента. Изделие не должно слишком плотно прилегать, между поясом и талией человека должно оставаться расстояние на ширину двух пальцев. Для снятия фиксатора, повторить действия в обратном порядке.

Справочно:

Размер*	Обхват талии*	Минимальный обхват (вокруг пациента и коляски)**	Максимальный обхват (вокруг пациента и коляски)**
S-M	от 550мм до 850мм	720мм	1950мм
L-XL	от 750мм до 1050мм	800мм	2300мм
2XL-3XL	от 1000 до 1400мм	920мм	2500мм

9. Фиксатор жилета* для взрослых для инвалидной коляски;

Фиксатор жилета* для взрослых с паховой вставкой для инвалидной коляски

При использовании жилета с паховой вставкой расположить жилет на коляске таким образом, чтобы вставка лежала на сиденье, а деталь самого жилета осталась спереди. При использовании жилета без вставки пропустить данный шаг. Посадить пациента в кресло-коляску. Обернуть жилет спереди пациента, протянуть боковые стропы через прорези коляски назад**, лямки завести за плечи. Со стороны спинки коляски застегнуть стропы жилета и отрегулировать по размерам пациента. Изделие не должно слишком плотно прилегать, между жилетом и талией человека должно оставаться расстояние на ширину двух пальцев. Для снятия фиксатора, повторить действия в обратном порядке.

Справочно:

Размер*	Обхват талии*	Минимальный обхват (вокруг пациента и коляски)**	Максимальный обхват (вокруг пациента и коляски)**
S-M	от 550мм до 850мм	720мм	1950мм
L-XL	от 750мм до 1050мм	800мм	2300мм
2XL-3XL	от 1000 до 1400мм	920мм	2500мм

10. Фиксатор пояса для взрослых от падения с кровати

Обернуть фиксатор вокруг талии* пациента. Со спины продеть узкую часть в петлю широкой и утянуть под обхват талии. Изделие не должно слишком плотно прилегать, между поясом и талией человека должно оставаться расстояние на ширину двух пальцев. Уложить пациента на кровать и зафиксировать стропы с двух сторон к раме кровати. Для снятия фиксатора, повторить действия в обратном порядке.

Справочно: * размер S-M, обхват талии от 600мм до 900мм

размер L-XL, обхват талии от 800мм до 1100мм

размер 2XL-3XL, обхват талии от 1000 до 1300мм

11. Фиксатор жилет для взрослых от падения с кровати

Надеть жилет* на пациента спереди. Со стороны спинки продеть узкую часть в петлю широкой и утянуть под обхват талии. Изделие не должно слишком плотно прилегать, между поясом и талией человека должно оставаться расстояние на ширину двух пальцев. При необходимости продеть дополнительные стропы в плечевые петли и зафиксировать пациента к изголовью кровати. Уложить пациента на кровать и зафиксировать стропы с двух сторон к раме кровати. **Внимание!** Нельзя оставлять пациента в таком состоянии без присмотра, при необходимости оставить пациента одного, плечевые стропы необходимо отстегнуть, вынуть из петель и убрать из зоны доступа пациента. Для снятия фиксатора, повторить действия в обратном порядке.

Справочно: * размер S-M, обхват талии от 600мм до 900мм
размер L-XL, обхват талии от 800мм до 1100мм
размер 2XL-3XL, обхват талии от 1000 до 1300мм

12. Фиксатор-аэро для детей 1-3 лет

Манжету фиксатора для руки обернуть вокруг запястья*, закрепить манжету на липучку. Закрепить на каком-либо приспособлении или предмете мебели посредством строп. Для снятия фиксатора, повторить действия в обратном порядке.

Справочно: * диапазон обхвата от 70мм до 140мм

13. Фиксатор-аэро для детей 2-6 лет

Манжету фиксатора для руки или ноги обернуть вокруг запястья* или щиколотки**, закрепить манжету на липучку и зафиксировать застежкой «фастекс». Манжету фиксатора для торса наложить поверх туловища. Закрепить на каком-либо приспособлении или предмете мебели посредством петель из строп, застегивающихся на застежку «фастекс». Длина регулируется. Для снятия фиксатора, повторить действия в обратном порядке.

Справочно: * диапазон обхвата от 120мм до 180мм;

** диапазон обхвата от 150мм до 200мм

14. Фиксатор-аэро для детей 7-11 лет

Манжету фиксатора для руки или ноги обернуть вокруг запястья* или щиколотки**, закрепить манжету на липучку и зафиксировать застежкой «фастекс». Манжету фиксатора для торса наложить поверх туловища. Закрепить на каком-либо приспособлении или предмете мебели посредством петель из строп, застегивающихся на застежку «фастекс». Длина регулируется. Для снятия фиксатора, повторить действия в обратном порядке.

Справочно: * диапазон обхвата от 120мм до 210мм;

** диапазон обхвата от 150мм до 250мм

Правила ухода за изделием

Ручная стирка в воде, с температурой не выше 40°C, в мыльном растворе хозяйственного мыла или моющего средства. Не отжимать. Сушить в разложенном состоянии вдали от отопительных приборов. Глажение, отбеливание, машинная сушка и автоклавирующие запрещены. Фиксатор выдерживает не менее 300 стирок.

В случае загрязнения фиксатора биологическими жидкостями, рекомендуется предварительно произвести дезинфекцию замачиванием в 3%-ном растворе перекиси водорода в течение 80 минут, затем стирать как указано выше.

Рекомендуется. При частом использовании фиксатора, помимо стирки, раз в месяц проводить дезинфекцию замачиванием в 3%-ным раствором перекиси водорода в течение 80 минут.

Технические характеристики

Фиксатор-вязка для взрослых для руки/ноги/торса выпускается со следующими характеристиками, указанными в Таблице 1.

Таблица 1

Наименование характеристики	Фиксатор-вязка для взрослых		
	для руки	для ноги	для торса
	арт. af076	арт. af075	арт. af077
1. Манжета:*			
-ширина в основании конуса, мм	120	150	-
-ширина в вершине конуса, мм	25	25	-
-ширина, мм	-	-	90
-длина, мм	310	390	700
2. Привязное устройство:*			
-количество строп, шт.	2	2	2
-ширина каждой стропы, мм	25	25	25
-длина каждой стропы, мм	1250	1250	1250
3. Разрывная нагрузка, не менее, Н	1700	1700	1700

* отклонение размеров $\pm 10\%$

Фиксатор мягкий для взрослых с застежкой «фастекс» или «рамка» для руки/ноги/грудины/бедер выпускается со следующими характеристиками, указанными в Таблице 2.

Таблица 2

Наименование характеристики	Фиксатор мягкий для взрослых с застежкой «фастекс» или «рамка»			
	для руки	для ноги	для грудины	для бедер
	арт. af068/ af068_r	арт. af067/ af067_r	арт. af070/ af070_r	арт. af069/ af069_r
1. Манжета:*				
-ширина, мм	70	70	90	90
-длина, мм	330	380	1000	500
1.1. Застежка «контакт» (липучка) на манжете:*				
-ширина, мм	50	50	-	-
-длина, мм	120	120		
2. Привязное устройство:*				
-количество строп, шт.	1	1	1	1
-ширина стропы, мм	40	40	40	40
-длина стропы, мм	1000	1000	1200**	1200**
3. Разрывная нагрузка застежки «фастекс», не менее, Н	1000	1000	1000	1000
4. Разрывная нагрузка изделия с застежкой «фастекс», не менее, Н	1000	1000	1000	1000
5. Разрывная нагрузка изделия с застежкой «рамка», не менее, Н	400	400	400	400

* отклонение размеров $\pm 10\%$

** с каждой стороны манжеты.

Фиксатор-аэро для взрослых для руки/ноги/грудины/бедер выпускается со следующими характеристиками, указанными в Таблице 3.

Таблица 3

Наименование характеристики	Фиксатор-аэро для взрослых			
	для руки	для ноги	для грудины	для бедер
	арт. af072	арт. af071	арт. af073	арт. af074
1. Манжета:*				
-ширина, мм	70	70	90	90
-длина, мм	330	380	1000	500
1.1. Застежка «контакт» (липучка) на манжете: *				
-ширина, мм	50	50	-	-
-длина, мм	120	140		
2. Привязное устройство:*				
-количество строп, шт.	1	1	1	1
-ширина стропы, мм	40	40	40	40
-длина стропы, мм	1000	1000	1200**	1200**
3. Разрывная нагрузка застежки «фастекс», не менее, Н	1000	1000	1000	1000
4. Разрывная нагрузка изделия, не менее, Н	1000	1000	1000	1000

* отклонение размеров $\pm 10\%$

** с каждой стороны манжеты

Фиксатор для взрослых для жесткой фиксации рук/ног/торса выпускается со следующими характеристиками, указанными в Таблице 4.

Таблица 4

Наименование характеристики	Фиксатор для взрослых для жесткой фиксации		
	рук	ног	торса
	арт. af093	арт. af094	арт. af095
1. Манжета:*			
-ширина, мм	100	100	
-длина, мм	350	400	-
-количество, шт.	2	2	
-расстояние между манжетами, мм	660	360	
1.1 Застежка «контакт» (липучка) на манжете:*			
-ширина, мм	50	50	-
-длина жесткой части, мм	70	70	
-длина мягкой части, мм	140	140	
2. Лента-основа:*			
-ширина, мм	100	100	100
-длина, мм	970	970	970
3. Привязное устройство:*			
-количество строп, шт.	2	2	1
-ширина каждой стропы, мм	25	25	25
-длина каждой стропы, мм	800	800	800
4. Разрывная нагрузка изделия, не менее, Н	3110	3110	3110

* отклонение размеров $\pm 10\%$

Фиксатор узкий/широкий для пассивной фиксации универсальный выпускается со следующими характеристиками, указанными в Таблице 5.

Таблица 5

Наименование характеристики	Фиксатор узкий для пассивной фиксации универсальный	Фиксатор широкий для пассивной фиксации универсальный
	арт. af107_1	арт. af107_2
1. Фиксатор:*		
-ширина, мм	50	100
-длина, мм	500	500
1.1. Застежка «контакт» (липучка) на манжете:*		
-ширина, мм	50	100 (2 по 50)
-длина, мм	235	235

* отклонение размеров $\pm 10 \%$

Фиксатор перчатка/варежка для взрослых выпускается со следующими характеристиками, указанными в Таблице 6.

Таблица 6

Наименование характеристики	Фиксатор перчатка для взрослых	Фиксатор варежка для взрослых
	арт. af1001	арт. af1002
1. Фиксатор:*		
-ширина, мм	175	220
-длина, мм	300	355
-толщина, мм	подушки -90	50
-ширина стропы, мм	30	30
- ширина манжеты, мм	-	80
-длина свободного конца стропы, мм	250	250
-длина мягкой части липучки, мм	-	100
-ширина мягкой части липучки, мм	-	50
-длина жесткой части липучки, мм	-	60
-ширина жесткой части липучки, мм	-	50
2. Привязное устройство:*		
- длина, мм	-	1450
-ширина, мм	-	30
3. Разрывная нагрузка застежки «фастекс», не менее, Н	1000	1000

* отклонение размеров $\pm 10 \%$

Фиксатор пояс для взрослых для инвалидной коляски выпускается со следующими характеристиками, указанными в Таблице 7.

Таблица 7

Наименование характеристики	Фиксатор пояс для взрослых для инвалидной коляски		
	размер S-M	размер L-XL	размер 2XL-3XL
	арт. af102_sm	арт. af102_lxl	арт. af102_2xl3xl
1. Манжета пояса:*			
-ширина, мм	150	150	150
-длина, мм	610	690	770
2. Рабочая длина строп с каждой стороны, мм*	650	750	850
3. Разрывная нагрузка застежки «фастекс», не менее, Н	1000	1000	1000

* отклонение размеров $\pm 10\%$

Фиксатор пояс для взрослых с паховой вставкой для инвалидной коляски выпускается со следующими характеристиками, указанными в Таблице 8.

Таблица 8

Наименование характеристики	Фиксатор пояс для взрослых с паховой вставкой для инвалидной коляски		
	размер S-M	размер L-XL	размер 2XL-3XL
	арт. af103_sm	арт. af103_lxl	арт. af103_2xl3xl
1. Манжета пояса:*			
-ширина, мм	150	150	150
-длина, мм	610	690	770
2. Рабочая длина строп с каждой стороны пояса, мм*	650	750	850
3. Длина паховой вставки, мм*	380	420	460
4. Ширина паховой вставки у пояса, мм*	120	130	140
5. Ширина паховой вставки внизу, мм*	70	75	80
6. Длина строп с каждой стороны от паховой вставки, мм*	600	600	600
7. Разрывная нагрузка застежки «фастекс», не менее, Н	1000	1000	1000

* отклонение размеров $\pm 10\%$

Фиксатор жилет для взрослых для инвалидной коляски выпускается со следующими характеристиками, указанными в Таблице 9.

Таблица 9

Наименование характеристики	Фиксатор жилет для взрослых для инвалидной коляски		
	размер S-M	размер L-XL	размер 2XL-3XL
	арт. af104_sm	арт. af104_lxl	арт. af104_2xl3xl
1. Манжета пояса:*			
-ширина, мм	150	150	150
-длина, мм	610	690	770
2. Рабочая длина строп с каждой стороны пояса, мм*	650	750	850
3. Ширина жилета у пояса, мм*	330	370	420
4. Длина жилета от пояса до горловины, мм*	210	220	230
5. Длина жилета от пояса до конца бретели, мм*	500	520	540
6. Ширина горловины, мм*	180	210	230
7. Длина строп на бретелях, мм*	400	400	400
8. Разрывная нагрузка застежки «фастекс», не менее, Н	1000	1000	1000

* отклонение размеров $\pm 10 \%$

Фиксатор жилет для взрослых с паховой вставкой для инвалидной коляски выпускается со следующими характеристиками, указанными в Таблице 10.

Таблица 10

Наименование характеристики	Фиксатор жилет для взрослых с паховой вставкой для инвалидной коляски		
	размер S-M	размер L-XL	размер 2XL-3XL
	арт. af105_sm	арт. af105_lxl	арт. af105_2xl3xl
1. Манжета пояса:*			
-ширина, мм	150	150	150
-длина, мм	610	690	770
2. Рабочая длина строп с каждой стороны пояса, мм*	650	750	850
3. Длина паховой вставки, мм*	380	420	460
4. Ширина паховой вставки у пояса, мм*	120	130	140
5. Ширина паховой вставки внизу, мм*	70	75	80
6. Длина строп с каждой стороны от паховой вставки, мм*	700	700	700
7. Ширина жилета у пояса, мм*	330	370	420
8. Длина жилета от пояса до горловины, мм*	210	220	230
9. Длина жилета от пояса до конца бретели, мм*	500	520	540
10. Ширина горловины, мм*	180	210	230

Наименование характеристики	Фиксатор жилет для взрослых с паховой вставкой для инвалидной коляски		
	размер S-M	размер L-XL	размер 2XL-3XL
	арт. af105_sm	арт. af105_lxl	арт. af105_2xl3xl
11. Длина строп на бретелях, мм*	400	400	400
12. Разрывная нагрузка застежки «фастекс», не менее, Н	1000	1000	1000

* отклонение размеров $\pm 10 \%$

Фиксатор пояс для взрослых от падения с кровати выпускается со следующими характеристиками, указанными в Таблице 11.

Таблица 11

Наименование характеристики	Фиксатор пояс для взрослых от падения с кровати		
	размер S-M	размер L-XL	размер 2XL-3XL
	арт. af089_sm	арт. af089_lxl	арт. af089_2xl3xl
1. Манжета пояса:*			
-ширина, мм	200	200	200
-длина, мм	1060	1260	1460
2. Длина строп с каждой стороны, мм*	1500	1500	1500
3. Максимальная длина петли стропы, мм*	600 (1200 в обхвате)	600 (1200 в обхвате)	600 (1200 в обхвате)
4. Разрывная нагрузка застежки «фастекс», не менее, Н	1000	1000	1000

* отклонение размеров $\pm 10 \%$

Фиксатор жилет для взрослых от падения с кровати выпускается со следующими характеристиками, указанными в Таблице 12.

Таблица 12

Наименование характеристики	Фиксатор жилет для взрослых от падения с кровати		
	размер S-M	размер L-XL	размер 2XL-3XL
	арт. af101_sm	арт. af101_lxl	арт. af101_2xl3xl
1. Ширина в груди от подмышки до подмышки (спереди), мм*	470	520	550
2. Длина от низа до горловины (спереди), мм*	350	360	370
3. Ширина бретели, мм*	100	110	120
4. Длина прорези (сзади), мм*	230	230	230
5. Длина боковых строп, мм*	1250	1250	1250
6. Длина строп на плечах, мм*	1500	1500	1500
7. Разрывная нагрузка застежки «фастекс», не менее, Н	1000	1000	1000

* отклонение размеров $\pm 10 \%$

Фиксатор-аэро для детей 1-3 лет для руки выпускается со следующими характеристиками, указанными в Таблице 13.

Таблица 13

Наименование характеристики	Фиксатор-аэро для детей 1-3 лет для руки
	арт. af091
1. Манжета:*	
-ширина, мм	35
-длина, мм	180
1.1 Застежка «контакт» (липучка) на манжете: *	
-ширина, мм	20
-длина, мм	50
2. Привязное устройство:*	
-количество строп, шт.	1
-ширина стропы, мм	12
-длина стропы, мм	500

* отклонение размеров $\pm 10 \%$

Фиксатор-аэро для детей 2-6 лет для руки/ноги/торса выпускается со следующими характеристиками, указанными в Таблице 14.

Таблица 14

Наименование характеристики	Фиксатор-аэро для детей 2-6 лет		
	для руки	для ноги	для торса
	арт. af084	арт. af085	арт. af096
1. Манжета:*			
-ширина, мм	50	50	60
-длина, мм	220	240	400
1.1 Застежка «контакт» (липучка) на манжете:*			
-ширина, мм	30	50	-
-длина, мм	50	60	
2. Привязное устройство:*			
-количество строп, шт.	1	1	1
-ширина стропы, мм	30	30	30
-длина стропы, мм	1000	1000	1000
3. Разрывная нагрузка застежки «фастекс», не менее, Н	1000	1000	1000

* отклонение размеров $\pm 10 \%$

Фиксатор-аэро для детей 7-11 лет для руки/ноги/торса выпускается со следующими характеристиками, указанными в Таблице 15.

Таблица 15

Наименование характеристики	Фиксатор-аэро для детей 7-11 лет		
	для руки	для ноги	для торса
	арт. af081	арт. af082	арт. af097
1. Манжета:*			
-ширина, мм	60	60	90
-длина, мм	260	300	600
1.1 Застежка «контакт» (липучка) на манжете:*			
			-

Наименование характеристики	Фиксатор-аэро для детей 7-11 лет		
	для руки	для ноги	для торса
	арт. af081	арт. af082	арт. af097
-ширина, мм	50	50	
-длина, мм	90	90	
3. Привязное устройство:*			
-количество строп, шт.	1	1	1
-ширина стропы, мм	30	30	30
-длина стропы, мм	1000	1000	1200
4. Разрывная нагрузка застежки «фастекс», не менее, Н	1000	1000	1000

* отклонение размеров $\pm 10\%$

Масса фиксатора соответствует указанной в Таблице 16.

Таблица 16

Наименование исполнения	Артикул	Масса, г ± 10 г
Фиксатор-вязка для взрослых для руки	af076	75
Фиксатор-вязка для взрослых для ноги	af075	90
Фиксатор-вязка для взрослых для торса	af077	100
Фиксатор мягкий для взрослых с застежкой «фастекс» для руки	af068	85
Фиксатор мягкий для взрослых с застежкой «фастекс» для ноги	af067	85
Фиксатор мягкий для взрослых с застежкой «фастекс» для грудины	af070	150
Фиксатор мягкий для взрослых с застежкой «фастекс» для бедер	af069	120
Фиксатор мягкий для взрослых с застежкой «рамка» для руки	af068_r	60
Фиксатор мягкий для взрослых с застежкой «рамка» для ноги	af067_r	65
Фиксатор мягкий для взрослых с застежкой «рамка» для грудины	af070_r	125
Фиксатор мягкий для взрослых с застежкой «рамка» для бедер	af069_r	100
Фиксатор-аэро для взрослых для руки	af072	95
Фиксатор-аэро для взрослых для ноги	af071	100
Фиксатор-аэро для взрослых для грудины	af073	205
Фиксатор-аэро для взрослых для бедер	af074	150
Фиксатор для взрослых для жесткой фиксации рук	af093	650
Фиксатор для взрослых для жесткой фиксации ног	af094	680
Фиксатор для взрослых для жесткой фиксации торса	af095	325
Фиксатор узкий для пассивной фиксации универсальный (50x500 мм)	af107_1	45
Фиксатор широкий для пассивной фиксации универсальный (100x500 мм)	af107_2	260
Фиксатор перчатка для взрослых	af1001	145
Фиксатор варежка для взрослых	af1002	165
Фиксатор пояс для взрослых для инвалидной коляски размер S-M	af102_sm	160
Фиксатор пояс для взрослых для инвалидной	af102_lxl	145

Наименование исполнения	Артикул	Масса, г ±10 г
коляски размер L-XL		
Фиксатор пояс для взрослых для инвалидной коляски размер 2XL-3XL	af102_2xl3xl	165
Фиксатор пояс для взрослых с паховой вставкой для инвалидной коляски размер S-M	af103_sm	220
Фиксатор пояс для взрослых с паховой вставкой для инвалидной коляски размер L-XL	af103_lxl	240
Фиксатор пояс для взрослых с паховой вставкой для инвалидной коляски размер 2XL-3XL	af103_2xl3xl	260
Фиксатор жилет для взрослых для инвалидной коляски размер S-M	af104_sm	295
Фиксатор жилет для взрослых для инвалидной коляски размер L-XL	af104_lxl	320
Фиксатор жилет для взрослых для инвалидной коляски размер 2XL-3XL	af104_2xl3xl	340
Фиксатор жилет для взрослых с паховой вставкой для инвалидной коляски размер S-M	af105_sm	375
Фиксатор жилет для взрослых с паховой вставкой для инвалидной коляски размер L-XL	af105_lxl	405
Фиксатор жилет для взрослых с паховой вставкой для инвалидной коляски размер 2XL-3XL	af105_2xl3xl	435
Фиксатор пояс для взрослых от падения с кровати размер S-M	af089_sm	225
Фиксатор пояс для взрослых от падения с кровати размер L-XL	af089_lxl	240
Фиксатор пояс для взрослых от падения с кровати размер 2XL-3XL	af089_2xl3xl	260
Фиксатор жилет для взрослых от падения с кровати размер S-M	af101_sm	325
Фиксатор жилет для взрослых от падения с кровати размер L-XL	af101_lxl	325
Фиксатор жилет для взрослых от падения с кровати размер 2XL-3XL	af101_2xl3xl	350
Фиксатор-аэро для детей 1-3 лет для руки	af091	10
Фиксатор-аэро для детей 2-6 лет для руки (220x50 мм)	af084	65
Фиксатор-аэро для детей 2-6 лет для ноги (240x50 мм)	af085	70
Фиксатор-аэро для детей 2-6 лет для торса (400x60 мм)	af096	95
Фиксатор-аэро для детей 7-11 лет для руки (260x60 мм)	af081	70
Фиксатор-аэро для детей 7-11 лет для ноги (300x60 мм)	af082	80
Фиксатор-аэро для детей 7-11 лет для торса (600x90 мм)	af097	135

Масса комплекта (любого) не более 1800 г.

Концы привязных строп дважды подвернуты и прострочены прямым швом в следующих исполнениях:

- фиксатор-вязка для взрослых (арт. af076, af075, af077);

- фиксатор мягкий для взрослых (арт. af068/af068_r, af067/af067_r, af070/af070_r , af069/af069_r);

- фиксатор-аэро для взрослых (арт. af072, af071, af073, af074);

- фиксатор перчатка/варежка для взрослых (арт. af1001, af1002);

- фиксатор-аэро для детей 2-6 лет (арт. af084, af085, af096);

- фиксатор-аэро для детей 7-11 лет (арт. af081, af082, af097).

Концы привязных строп дважды подвернуты, с включением в подгиб резинки для скрепления свернутого свободного конца стропы, и прострочены прямым швом по периметру и крест-накрест в следующих исполнениях:

- фиксатор пояс для взрослых для инвалидной коляски (арт. af102_sm, af102_lxl, af102_2xl3xl);

- фиксатор пояс для взрослых с паховой вставкой для инвалидной коляски (арт. af103_sm, af103_lxl, af103_2xl3xl);

- фиксатор жилет для взрослых для инвалидной коляски (арт. af104_sm, af104_lxl, af104_2xl3xl);

- фиксатор жилет для взрослых с паховой вставкой для инвалидной коляски (арт. af105_sm, af105_lxl, af105_2xl3xl);

- фиксатор пояс для взрослых от падения с кровати (арт. af089_sm, af089_lxl, af089_2xl3xl);

- фиксатор жилет для взрослых от падения с кровати (арт. af101_sm, af101_lxl, af101_2xl3xl).

Концы привязных строп фиксатора узкого для пассивной фиксации универсального (арт. af107_1) подогнуты под липучку, фиксатора широкого для пассивной фиксации универсального (арт. af107_2) - обожжены.

Манжета обметана оверлочным швом в следующих исполнениях:

- фиксатор-аэро для взрослых (арт. af072, af071, af073, af074);

- фиксатор-аэро для детей 1-3 лет (арт. af091);

- фиксатор-аэро для детей 2-6 лет (арт. af084, af085, af096);

- фиксатор-аэро для детей 7-11 лет (арт. af081, af082, af097).

Все строчки в изделии (любого исполнения) должны быть равномерными, непрерывным, без пропусков и выполнены на одинаковом расстоянии от края. Концы всех строчек закреплены. Готовое изделие очищено от концов ниток.

Изделие не должно иметь внешних дефектов в виде дыр, разрывов, разрезов (если они не предусмотрены конструкцией) и загрязнений различного происхождения.

Фиксатор устойчив к многократным стиркам в воде с добавлением моющего средства или хозяйственного мыла. Сммотри раздел «Правила ухода за изделием». Фиксатор выдерживает не менее 300 стирок.

Изменение размеров изделия после первой стирки (усадка) не более 3% их размеров до стирки.

Фиксатор устойчив к дезинфекции 3%-ным раствором перекиси водорода.

Срок годности фиксатора не менее 2 лет со дня изготовления.

Материалы, контактирующие с организмом человека:

1) 100% хлопчатобумажная ткань марки «Шуйские ситцы» (ГОСТ 7701-93), окрашенная синим красителем марки «BEZAKTIV BLAU V-RN SPEZ» производства фирмы «СНТ Germany GmbH» (Германия) – фиксатор-вязка для взрослых для всех частей тела, фиксатор перчатка для взрослых, фиксатор пояс для взрослых от падения с кровати, фиксатор жилет для взрослых от падения с кровати;

2) 100% хлопчатобумажная ткань марки «Шуйские ситцы» (ГОСТ 29298-2005), окрашенная синим красителем марки «BEZAKTIV BLAU V-RN SPEZ» производства фирмы «СНТ Germany GmbH» (Германия) – фиксатор-вязка для взрослых для всех частей тела, фиксатор перчатка для взрослых, фиксатор пояс для взрослых от падения с кровати, фиксатор жилет для взрослых от падения с кровати;

3) Ткань марки «CHERYL TEX», производства фирмы «SHAOXING QIWO TRADING CO., LTD» (Китай), следующего состава: полиэстер-65%, хлопок-32% и эластан (полиуретан) - 3%; окрашенная синим красителем марки «Hostatint blue E-B2G» производства фирмы «Clariant Chemicals (China) Ltd.» (Китай) – фиксатор варежка;

4) Нейлон марки N/oxford 210D, производства фирмы «DONG JIN INTERNATIONAL CORP» (Корея), окрашенный черным красителем марки «Hostatint black E-BLN» производства фирмы «Clariant (Korea) Ltd.» (Корея) - фиксатор мягкий для взрослых с застежкой «фастекс» для всех частей тела, фиксатор мягкий для взрослых с застежкой «рамка» для всех частей тела, фиксатор пояс для взрослых для инвалидной коляски, фиксатор пояс для взрослых с паховой вставкой для инвалидной коляски, фиксатор жилет для взрослых для инвалидной коляски, фиксатор жилет для взрослых с паховой вставкой для инвалидной коляски;

5) Полиэфир марки PL15d/64, производства фирмы «Dongguan Tok Zin Industrial Co., Ltd.» (Китай), окрашенный черным красителем марки LONG SHENG, производства фирмы «Shenghong Group Co.,» (Китай) – фиксатор для взрослых для жесткой фиксации рук, ног, торса; фиксатор узкий и широкий для пассивной фиксации универсальный;

6) Каучук микропористый марки Аэропрен (ТУ 8155-002-0187349088-2014), с одной стороны термоскрепленный с нейлоном (полиамид) марки ПА6, производства фирмы «Jeong In Co., Ltd.» (Республика Корея), с другой стороны термоскрепленный с полиамидом марки FORTISFLEX, производства фирмы производства фирмы «Jeong In Co., Ltd.» (Республика Корея) – фиксаторы-аэро для взрослых и детей.

Комплектность

Поставка фиксатора, отдельными изделиями, соответствует указанному в Таблице 17.

Таблица 17

Наименование исполнения*	Артикул	Количество, шт.*
Фиксатор-вязка для взрослых для руки или	af076	1
Фиксатор-вязка для взрослых для ноги или	af075	1
Фиксатор-вязка для взрослых для торса или	af077	1
Фиксатор мягкий для взрослых с застежкой «фастекс» для руки или	af068	1
Фиксатор мягкий для взрослых с застежкой «фастекс» для ноги или	af067	1
Фиксатор мягкий для взрослых с застежкой «фастекс» для грудины или	af070	1
Фиксатор мягкий для взрослых с застежкой «фастекс» для бедер или	af069	1
Фиксатор мягкий для взрослых с застежкой «рамка» для руки или	af068_r	1
Фиксатор мягкий для взрослых с застежкой «рамка» для ноги или	af067_r	1
Фиксатор мягкий для взрослых с застежкой «рамка» для	af070_r	1

Наименование исполнения*	Артикул	Количество, шт.*
грудины или		
Фиксатор мягкий для взрослых с застежкой «рамка» для бедер или	af069_r	1
Фиксатор-аэро для взрослых для руки или	af072	1
Фиксатор-аэро для взрослых для ноги или	af071	1
Фиксатор-аэро для взрослых для грудины или	af073	1
Фиксатор-аэро для взрослых для бедер или	af074	1
Фиксатор для взрослых для жесткой фиксации рук или	af093	1
Фиксатор для взрослых для жесткой фиксации ног или	af094	1
Фиксатор для взрослых для жесткой фиксации торса или	af095	1
Фиксатор узкий для пассивной фиксации универсальный (50x500 мм) или	af107_1	2
Фиксатор широкий для пассивной фиксации универсальный (100x500 мм) или	af107_2	2
Фиксатор перчатка для взрослых или	af1001	1
Фиксатор варежка для взрослых или	af1002	1
Фиксатор пояс для взрослых для инвалидной коляски размер S-M или	af102_sm	1
Фиксатор пояс для взрослых для инвалидной коляски размер L-XL или	af102_lxl	1
Фиксатор пояс для взрослых для инвалидной коляски размер 2XL-3XL или	af102_2x13xl	1
Фиксатор пояс для взрослых с паховой вставкой для инвалидной коляски размер S-M или	af103_sm	1
Фиксатор пояс для взрослых с паховой вставкой для инвалидной коляски размер L-XL или	af103_lxl	1
Фиксатор пояс для взрослых с паховой вставкой для инвалидной коляски размер 2XL-3XL или	af103_2x13xl	1
Фиксатор жилет для взрослых для инвалидной коляски размер S-M или	af104_sm	1

Наименование исполнения*	Артикул	Количество, шт.*
Фиксатор жилет для взрослых для инвалидной коляски размер L-XL или	af104_lxl	1
Фиксатор жилет для взрослых для инвалидной коляски размер 2XL-3XL или	af104_2xl3xl	1
Фиксатор жилет для взрослых с паховой вставкой для инвалидной коляски размер S-M или	af105_sm	1
Фиксатор жилет для взрослых с паховой вставкой для инвалидной коляски размер L-XL или	af105_lxl	1
Фиксатор жилет для взрослых с паховой вставкой для инвалидной коляски размер 2XL-3XL или	af105_2xl3xl	1
Фиксатор пояс для взрослых от падения с кровати размер S-M или	af089_sm	1
Фиксатор пояс для взрослых от падения с кровати размер L-XL или	af089_lxl	1
Фиксатор пояс для взрослых от падения с кровати размер 2XL-3XL или	af089_2xl3xl	1
Фиксатор жилет для взрослых от падения с кровати размер S-M или	af101_sm	1
Фиксатор жилет для взрослых от падения с кровати размер L-XL или	af101_lxl	1
Фиксатор жилет для взрослых от падения с кровати размер 2XL-3XL или	af101_2xl3xl	1
Фиксатор-аэро для детей 1-3 лет для руки или	af091	1
Фиксатор-аэро для детей 2-6 лет для руки (220x50 мм) или	af084	1
Фиксатор-аэро для детей 2-6 лет для ноги (240x50 мм) или	af085	1
Фиксатор-аэро для детей 2-6 лет для торса (400x60 мм) или	af096	1
Фиксатор-аэро для детей 7-11 лет для руки (260x60 мм) или	af081	1
Фиксатор-аэро для детей 7-11 лет для ноги (300x60 мм) или	af082	1
Фиксатор-аэро для детей 7-11 лет для торса (600x90 мм)	af097	1
Инструкция по применению (на транспортную тару)	-	1

* Требуемое исполнение и количество, по согласованию с Заказчиком

Поставка фиксатора в комплектах, соответствует указанному в Таблице 18.

Таблица 18

Наименование исполнения*	Артикул	Количество, шт.*
Комплект. Фиксатор-вязка для взрослых (2 руки, 2 ноги, 2 торса) или	af080	1
Комплект. Фиксатор-вязка для взрослых (2 руки, 2 ноги, 1 торс) или	af080_2	1
Комплект. Фиксатор-вязка для взрослых (2 руки, 2 ноги) или	af080_1	1
Комплект. Фиксатор мягкий для взрослых с застежкой «фастекс» (2 руки, 2 ноги, 1 грудина, 1 бедра) или	af078	1
Комплект. Фиксатор мягкий для взрослых с застежкой «фастекс» (2 руки, 2 ноги, 1 грудина) или	af078_2	1
Комплект. Фиксатор мягкий для взрослых с застежкой «фастекс» (2 руки, 2 ноги, 1 бедра) или	af078_3	1
Комплект. Фиксатор мягкий для взрослых с застежкой «фастекс» (2 руки, 2 ноги) или	af078_1	1
Комплект. Фиксатор мягкий для взрослых с застежкой «рамка» (2 руки, 2 ноги, 1 грудина, 1 бедра) или	af078_r	1
Комплект. Фиксатор мягкий для взрослых с застежкой «рамка» (2 руки, 2 ноги, 1 грудина) или	af078_r2	1
Комплект. Фиксатор мягкий для взрослых с застежкой «рамка» (2 руки, 2 ноги, 1 бедра) или	af078_r3	1
Комплект. Фиксатор мягкий для взрослых с застежкой «рамка» (2 руки, 2 ноги) или	af078_r1	1
Комплект. Фиксатор-аэро для взрослых (2 руки, 2 ноги, 1 грудина, 1 бедра) или	af079	1
Комплект. Фиксатор-аэро для взрослых (2 руки, 2 ноги, 1 грудина) или	af079_2	1
Комплект. Фиксатор-аэро для взрослых (2 руки, 2 ноги, 1 бедра) или	af079_3	1
Комплект. Фиксатор-аэро для взрослых (2 руки, 2 ноги) или	af079_1	1
Комплект. Фиксатор для взрослых для жесткой фиксации (2 руки, 2 ноги) или	af108_1	1
Комплект. Фиксатор для взрослых для жесткой фиксации (2 руки, 2 ноги, 1 торс) или	af108_2	1

Наименование исполнения*	Артикул	Количество, шт.*
Комплект. Фиксатор-аэро для детей 2-6 лет (2 руки, 2 ноги) или	af086	1
Комплект. Фиксатор-аэро для детей 2-6 лет (2 руки, 2 ноги, 1 торс) или	af098	1
Комплект. Фиксатор-аэро для детей 7-11 лет (2 руки, 2 ноги) или	af083	1
Комплект. Фиксатор-аэро для детей 7-11 лет (2 руки, 2 ноги, 1 торс) или	af099	1
Комплект. Фиксатор-аэро для детей 7-11 лет (2 руки, 2 ноги, 2 торса)	af100	1
Инструкция по применению (на транспортную тару)	-	1

* Требуемые комплекты и количество, по согласованию с Заказчиком

Маркировка.

Маркировка нанесена на этикетку или упаковку типографическим способом.

На потребительской упаковке фиксатора должно быть указано:

- наименование и / или логотип изготовителя, его адрес;
- наименование изделия;
- наименование исполнения;
- размер (при наличии);
- количество изделий в упаковке (для комплектов);
- номер партии;
- дата изготовления;
- гарантии изготовителя;
- номер и дата регистрационного удостоверения;
- обозначение настоящих технических условий;
- условия хранения;
- символы      по ГОСТ ISO 3758.

На маркировке могут быть использованы символы по ГОСТ Р ИСО 15223-1.

Таблица Расшифровки символов информации об уходе

	ручная стирка, максимальная температура 40°C
	запрещается сушить и выжимать в машине или сушке для изделий
	сушка на плоскости в тени после стирки без отжима
	глажение запрещено
	не отбеливать, запрещено использование стиральных порошков с отбеливателями

Упаковка

Фиксатор (любого исполнения или комплект), уложен в потребительскую упаковку - полипропиленовый пакет со скотч-клапаном или застежкой «зиплок» или стрейч-пленка.

Транспортирование и хранение

Фиксаторы, упакованные в транспортную тару, в соответствии с требованиями ТУ 32.50.50-004-17241647-2021, транспортируют любым видом транспорта, в крытых транспортных средствах, по условиям хранения 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150 (от -50°C до +40°C), в соответствии с правилами, действующими на данном виде транспорта.

Фиксаторы в упаковке изготовителя, должны храниться в упакованном виде, в закрытых складских помещениях, на стеллажах в соответствии с условиями хранения 1 (Л) ГОСТ 15150 (от +5°C до +40°C), исключая воздействия агрессивных сред (масла, растворители и т.п.) на расстоянии не менее 1 метра от нагревательных приборов, защищенными от воздействия прямым солнечным лучам, согласно правилам пожарной безопасности.

Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие фиксатора требованиям технических условий (ТУ 32.50.50-004-17241647-2021) при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных настоящей инструкцией по применению. Срок годности фиксатора 2 года со дня изготовления.

Гарантийный срок хранения и/или эксплуатации изделия – 12 месяцев со дня изготовления.

Гарантийным случаем не являются:

- механические повреждения (включая случайные);
- повреждения, вызванные использованием изделия не по назначению;
- дефекты, возникшие как следствие нарушения правил ухода за изделием;
- самостоятельный ремонт или внесение изменений в конструкцию изделия.

Фиксатор ремонту не подлежит.

Утилизация и дезинфекция

Утилизация осуществляется в соответствии с правилами, действующими в лечебно-профилактическом учреждении и СанПиН 2.1.3684:

- не использованный фиксатор – как медицинские отходы «Класс А»;
- фиксатор после применения – как медицинские отходы «Класс Б».

В домашних условиях изделия утилизируются вместе с бытовыми отходами.

Дезинфекцию изделия проводят 3%-ным раствором перекиси водорода, в соответствии с МУ-287-113.

Производитель

Общество с ограниченной ответственностью «Альцстор» (ООО «Альцстор»):

Адрес (место нахождения): 111672, город Москва, улица Суздальская, дом 38, корпус 1, квартира 99

E-mail: alzstore@yandex.ru

Тел. 8-800-222-48-78

Фиксатор соответствует требованиям национальных стандартов: ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования»; ГОСТ Р ИСО 10993-2-2009 и серии ГОСТ ISO 10993 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий», части 1, 5, 10, 12.

Фиксатор для ограничения подвижности пациента АльцФикСТМ
по ТУ 32.50.50-004-17241647-2021.

Исполнения:

I. Отдельные изделия.

1. Для взрослых:

- 1.1. Фиксатор-вязка для взрослых для руки;
- 1.2. Фиксатор-вязка для взрослых для ноги;
- 1.3. Фиксатор-вязка для взрослых для торса;
- 1.4. Фиксатор мягкий для взрослых с застежкой «фастекс» для руки;
- 1.5. Фиксатор мягкий для взрослых с застежкой «фастекс» для ноги;
- 1.6. Фиксатор мягкий для взрослых с застежкой «фастекс» для грудины;
- 1.7. Фиксатор мягкий для взрослых с застежкой «фастекс» для бедер;
- 1.8. Фиксатор мягкий для взрослых с застежкой «рамка» для руки;
- 1.9. Фиксатор мягкий для взрослых с застежкой «рамка» для ноги;
- 1.10. Фиксатор мягкий для взрослых с застежкой «рамка» для грудины;
- 1.11. Фиксатор мягкий для взрослых с застежкой «рамка» для бедер;
- 1.12. Фиксатор-аэро для взрослых для руки;
- 1.13. Фиксатор-аэро для взрослых для ноги;
- 1.14. Фиксатор-аэро для взрослых для грудины;
- 1.15. Фиксатор-аэро для взрослых для бедер;
- 1.16. Фиксатор для взрослых для жесткой фиксации рук;
- 1.17. Фиксатор для взрослых для жесткой фиксации ног;
- 1.18. Фиксатор для взрослых для жесткой фиксации торса;
- 1.19. Фиксатор узкий для пассивной фиксации универсальный (50х500 мм);
- 1.20. Фиксатор широкий для пассивной фиксации универсальный (100х500 мм);
- 1.21. Фиксатор перчатка для взрослых;
- 1.22. Фиксатор варежка для взрослых;
- 1.23. Фиксатор пояс для взрослых для инвалидной коляски размер S-M;
- 1.24. Фиксатор пояс для взрослых для инвалидной коляски размер L-XL;
- 1.25. Фиксатор пояс для взрослых для инвалидной коляски размер 2XL-3XL;
- 1.26. Фиксатор пояс для взрослых с паховой вставкой для инвалидной коляски размер S-M;
- 1.27. Фиксатор пояс для взрослых с паховой вставкой для инвалидной коляски размер L-XL;
- 1.28. Фиксатор пояс для взрослых с паховой вставкой для инвалидной коляски размер 2XL-3XL;
- 1.29. Фиксатор жилет для взрослых для инвалидной коляски размер S-M;
- 1.30. Фиксатор жилет для взрослых для инвалидной коляски размер L-XL;
- 1.31. Фиксатор жилет для взрослых для инвалидной коляски размер 2XL-3XL;
- 1.32. Фиксатор жилет для взрослых с паховой вставкой для инвалидной коляски размер S-M;
- 1.33. Фиксатор жилет для взрослых с паховой вставкой для инвалидной коляски размер L-XL;
- 1.34. Фиксатор жилет для взрослых с паховой вставкой для инвалидной коляски размер 2XL-3XL;
- 1.35. Фиксатор пояс для взрослых от падения с кровати размер S-M;
- 1.36. Фиксатор пояс для взрослых от падения с кровати размер L-XL;
- 1.37. Фиксатор пояс для взрослых от падения с кровати размер 2XL-3XL;
- 1.38. Фиксатор жилет для взрослых от падения с кровати размер S-M;
- 1.39. Фиксатор жилет для взрослых от падения с кровати размер L-XL;
- 1.40. Фиксатор жилет для взрослых от падения с кровати размер 2XL-3XL.

2. Для детей:

- 2.1. Фиксатор-аэро для детей 1-3 лет для руки;

- 2.2. Фиксатор-аэро для детей 2-6 лет для руки (220х50 мм);
- 2.3. Фиксатор-аэро для детей 2-6 лет для ноги (240х50 мм);
- 2.4. Фиксатор-аэро для детей 2-6 лет для торса (400х60 мм);
- 2.5. Фиксатор-аэро для детей 7-11 лет для руки (260х60 мм);
- 2.6. Фиксатор-аэро для детей 7-11 лет для ноги (300х60 мм);
- 2.7. Фиксатор-аэро для детей 7-11 лет для торса (600х90 мм).

II. Комплекты.

1. Для взрослых:

- 1.1. Комплект. Фиксатор-вязка для взрослых (2 руки, 2 ноги);
- 1.2. Комплект. Фиксатор-вязка для взрослых (2 руки, 2 ноги, 1 торс);
- 1.3. Комплект. Фиксатор-вязка для взрослых (2 руки, 2 ноги, 2 торса);
- 1.4. Комплект. Фиксатор мягкий для взрослых с застежкой «фастекс» (2 руки, 2 ноги);
- 1.5. Комплект. Фиксатор мягкий для взрослых с застежкой «фастекс» (2 руки, 2 ноги, 1 грудина);
- 1.6. Комплект. Фиксатор мягкий для взрослых с застежкой «фастекс» (2 руки, 2 ноги, 1 бедра);
- 1.7. Комплект. Фиксатор мягкий для взрослых с застежкой «фастекс» (2 руки, 2 ноги, 1 грудина, 1 бедра);
- 1.8. Комплект. Фиксатор мягкий для взрослых с застежкой «рамка» (2 руки, 2 ноги);
- 1.9. Комплект. Фиксатор мягкий для взрослых с застежкой «рамка» (2 руки, 2 ноги, 1 грудина);
- 1.10. Комплект. Фиксатор мягкий для взрослых с застежкой «рамка» (2 руки, 2 ноги, 1 бедра);
- 1.11. Комплект. Фиксатор мягкий для взрослых с застежкой «рамка» (2 руки, 2 ноги, 1 грудина, 1 бедра);
- 1.12. Комплект. Фиксатор-аэро для взрослых (2 руки, 2 ноги);
- 1.13. Комплект. Фиксатор-аэро для взрослых (2 руки, 2 ноги, 1 грудина);
- 1.14. Комплект. Фиксатор-аэро для взрослых (2 руки, 2 ноги, 1 бедра);
- 1.15. Комплект. Фиксатор-аэро для взрослых (2 руки, 2 ноги, 1 грудина, 1 бедра);
- 1.16. Комплект. Фиксатор для взрослых для жесткой фиксации (2 руки, 2 ноги);
- 1.17. Комплект. Фиксатор для взрослых для жесткой фиксации (2 руки, 2 ноги, 1 торс).

2. Для детей:

- 2.1. Комплект. Фиксатор-аэро для детей 2-6 лет (2 руки, 2 ноги);
- 2.2. Комплект. Фиксатор-аэро для детей 2-6 лет (2 руки, 2 ноги, 1 торс);
- 2.3. Комплект. Фиксатор-аэро для детей 7-11 лет (2 руки, 2 ноги);
- 2.4. Комплект. Фиксатор-аэро для детей 7-11 лет (2 руки, 2 ноги, 1 торс);
- 2.5. Комплект. Фиксатор-аэро для детей 7-11 лет (2 руки, 2 ноги, 2 торса).

протокол и завереновано 23 июля
персональной дирекции ООО «Ангел»
/ Вильям Е.С. /

