

«Утверждаю»

Директор ООО «БЕЛПА-МЕД»

Политико О.К.

18 апреля 2011 г.



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Изделия медицинского назначения

«Бинт медицинский эластичный тканый»

ТУ РБ 800007404.007-2003 «изм.2»

Бинт медицинский эластичный тканый, далее по тексту бинт, предназначен для профилактики и лечения хронической венозной недостаточности, тромбозов в до и послеоперационный периоды, травматических отеков, посттравматических осложнений, удержания эндопротезов в стабильном состоянии при пластических операциях.

Бинт надежно фиксируется на конечностях больного путем последовательного кольцеобразного накручивания (схема наложения бинта указана на этикетке – вкладыше), при этом последний виток фиксируется при помощи металлических клипс, состоящих из двух замков, соединенных между собой отрезком бельевой резинки.

Бинт изготавливается разной длины и ширины из хлопчатобумажной пряжи. Размер изделия обозначается на этикетке – вкладыше в упаковке. Бинт не вызывает аллергических и других побочных эффектов при контакте с кожей больного.

Стирать бинт необходимо в ненасыщенном мыльном растворе (10г. мягкого моющего средства на 200 см. куб. воды) при температуре не более 40 град. Цельсия в течение 10-ти минут в режиме свободного полоскания без сильного трения и выкручивания. Полоскать изделие следует в объеме воды не менее 3000 см.куб. при температуре не более 20 град. Цельсия. Отжимать не выкручивая, сушить раскладывая на горизонтальной поверхности вдали от источников тепла. Не гладить.

Разработал:

Шендеров И.М.