

«Утверждаю»

Директор ООО «БЕЛПА-МЕД»

Политико О.К.

18 апреля 2011 г.



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Изделия медицинского назначения

«Бандаж голеностопа»

ТУ РБ 800007404.007-2003 «изм.2»

Бандаж голеностопа, далее бандаж предназначен для лечения растяжения связок и других заболеваний голеностопного сустава. Применяется при отеках, снижает болевые ощущения в голеностопе.

Бандаж надевается на голеностопный сустав в положении сидя и образует тугую давящую повязку.

Бандаж изготавливается из хлопчатобумажной, полиэфирной, либо другой эластичной ленты, обеспечивающей необходимую компрессию.

Размер изделия подбирают по обхвату щиколотки, согласно таблице 1 нанесенной на первичную упаковку.

Таблица 1

Размер изделия	Обхват колена, см.
1	20-22
2	22-24
3	24-26
4	26-28

Стирать бандаж необходимо в ненасыщенном мыльном растворе (10г. мягкого моющего средства на 200см.куб.воды) при температуре 40 +/- 2град.Цельсия в течении 10 минут в режиме свободного полоскания без сильного трения и выкручивания. Полоскать изделие следует в объеме воды не менее 5000см.куб. при температуре 20 +/- 2град.Цельсия. Отжимать не выкручивая, сушить вдали от источников тепла. Не гладить.

Разработал:
Шендеров И.М.