

«Утверждаю»

Директор ООО «БЕЛПА-МЕД»

Политико О.К.

18 апреля 2011 г.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Изделия медицинского назначения

«Корректор осанки»

ТУ РБ 800007404.005-2002 «изм.2»

Корректор осанки, далее корректор, предназначен для профилактики и лечения (коррекции) нарушений осанки, сутулости, начальных стадий сколиоза, кифоза, в период реабилитации после травм и операций в реабилитационный период.

Корректор рекомендуется носить в течение 3 – 4 часов ежедневно, начиная с 15 – 20 минут, при этом надевать на нижнее белье (майку, футболку) из хлопчатобумажной ткани. Корректор не рекомендуют использовать при занятии спортом и во время сна. Изделие фиксируется на теле в подреберной области посредством поясной ленты с контактной застежкой типа «велкро». При этом спинка должна быть натянута.

Корректор производится из эластичных лент, выработанных из полиамидных нитей трех расцветок: белой, черной, бежевой (телесной). В качестве уточной допускается применение моноамидной нити.

Размер изделия подбирают по обхвату груди и высоте спинки согласно размеров, указанных в таблице 1, нанесенных на первичную упаковку изделия.

Таблица 1.

Размер изделия	Обхват груди см	Высота спины до талии, см
1	64-72	31-33
2	72-80	33-36
3	80-90	36-39
4	90-100	39-42
5	100-110	42-45
6	110-120	45-48
7	120-130	48-51

Стирать корректор необходимо в ненасыщенном мыльном растворе (10г. мягкого моющего средства на 200 см. куб. воды) при температуре не более 40 град. Цельсия в течении 10-ти минут в режиме свободного полоскания без сильного трения и выкручивания. Полоскать изделие следует в объеме воды не менее 5000 см.куб. при температуре не более 20 град. Цельсия. Отжимать не выкручивая, сушить раскладывая на горизонтальной поверхности вдали от источников тепла. Не гладить.

Разработал:

Шендеров И.М.