


«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «АБС-МЕД»


Лезнин Г.И.
«03» мая 2009 г.

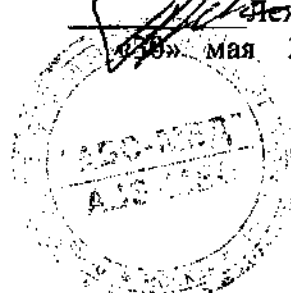

ИНСТРУКЦИЯ

по применению изделия «Пояс медицинский эластичный»

Пояс предназначен для профилактики и лечения пояснично-крестцовых радикулитов, невритов, остеохондрозов. Рекомендуется использовать для работы в условиях холода, влажности, сквозняков, при занятиях спортом на открытом воздухе в холодное время года.

С лечебной целью пояс рекомендуется носить в период обострения болезни круглые сутки, а с профилактической целью - в период неблагоприятных условий среды.

Подбор изделия по фигуре следует производить в соответствии с данными таблицы, помещенной на картонной коробке упаковки. Для этого следует измерить окружность талии и бедер, а затем выбрать размер пояса (с 1-го по 7-ой).

Пояс не рекомендуется использовать при местных заболеваниях кожи и при индивидуальной непереносимости компонентов сырья пациентом.

Стирать изделие необходимо мягкими моющими средствами в мыльной пене при температуре не более +40 град. Цельсия в течение 10-ти минут. При стирке - не тереть и не выкручивать. Полоскать пояс следует в объеме воды не менее 5000 см. куб. при температуре не более 20 град. Цельсия. Сушить - раскладывая на горизонтальной поверхности вдали от источника тепла. Не гладить.

Хранить пояс рекомендуется при комнатной температуре в первичной упаковке.

Гарантийный срок использования 12 месяцев.

Гарантийный срок хранения 36 месяцев.