


«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО « АБС-МЕД»


Лежнин Г.И.
«00» мая 2009 г.

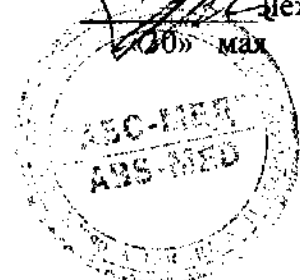

ИНСТРУКЦИЯ

по применению изделия «Бандаж фиксирующий компрессионный»

Бандаж фиксирующий компрессионный, предназначен для жесткой фиксации пояснично-крестцового отдела позвоночника при возникновении смещения позвоночных дисков. Рекомендован при выполнении тяжелой физической работы, связанной с перемещениями грузов, а так же при занятиях спортом: тяжелой атлетикой, гимнастикой. Бандаж способствует сохранению правильной осанки и оберегает позвоночник от возможных деформаций.

Бандаж изготавливается из эластичной ткани 5-х размеров, которые выбираются в зависимости от окружности талии. Для подбора изделия необходимо измерить окружность талии и выбрать необходимый размер по таблице, нанесенной на картонный ярлык-вкладыш в упаковке. Бандаж надевается на пояснично-крестцовую область тела, при этом необходимая компрессия задается дополнительной поясной лентой с застежкой «велкро». Носить бандаж на теле рекомендуется только на время выполнения тяжелой работы, либо занятиях тяжелыми видами спорта, но не более 3 - 4 -х часов в день. Запрещается спать при надетом бандаже на теле. Изделие из хлопчатобумажной ткани допускается надевать на голое тело, а изготовленное из полиэфирной ткани рекомендуется надевать только поверх майки, футболки и т.д.

Бандаж не рекомендуется использовать при местных заболеваниях кожи и при индивидуальной непереносимости компонентов сырья пациентом.

Стирать изделие необходимо мягкими моющими средствами в мыльной пене при температуре не более +40 град. Цельсия в течение 10-ти минут. При стирке - не тереть и не выкручивать. Полоскать бандаж следует в объеме воды не менее 5000 см. куб. при температуре не более 20 град. Цельсия. Сушить - раскладывая на горизонтальной поверхности вдали от источника тепла. Не гладить.

Хранить бандаж рекомендуется при комнатной температуре в первичной упаковке.

Гарантийный срок использования 12 месяцев.

Гарантийный срок хранения 36 месяцев.