


«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «АБС-МЕД»

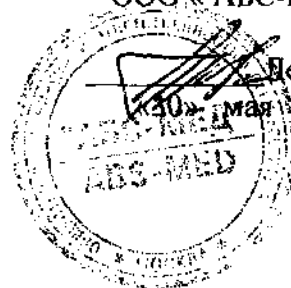

Вежнин Г.И.
30 мая 2009 г.

ИНСТРУКЦИЯ по применению изделия «Бандаж эластичный послеоперационный»

Бандаж предназначен для мягкой фиксации внутренних органов в поясничной области больного после проведения полостных операций, а так же при лечении грыж. Использование бандажа позволяет сократить реабилитационный период, разгружает область раны, восстанавливает тонус мышц.

Бандаж эластичный послеоперационный надевается на поясничную область позвоночника и фиксируется при помощи контактной ленты. Место смыкания бандажа должно находиться на достаточном удалении от хирургического шва. Подбор изделия следует производить в соответствии с данными таблицы, помещенной на упаковке.

Бандаж не рекомендуется использовать при местных заболеваниях кожи и при индивидуальной непереносимости компонентов сырья пациентом.

Стирать изделие необходимо мягкими моющими средствами в мыльной пене при температуре не более +40 град. Цельсия в течение 10-ти минут. При стирке - не тереть и не выкручивать. Полоскать бандаж следует в объеме воды не менее 5000 см. куб. при температуре не более 20 град. Цельсия. Сушить - раскладывая на горизонтальной поверхности вдали от источника тепла. Не гладить.

Хранить бандаж рекомендуется при комнатной температуре в первичной упаковке.

Гарантийный срок использования 12 месяцев.

Гарантийный срок хранения 36 месяцев.