

«Утверждаю»
Директор ООО «БЕЛПА-МЕД»
Политико О.К.
18 апреля 2011 г.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Изделия медицинского назначения

«Наколенник эластичный»

ТУ РБ 800007404.007-2003 «изм.2»

Наколенник эластичный (бандаж коленный мягкой фиксации), далее наколенник, предназначен для лечения ушибов, вывихов, растяжений, отеков и других травматических осложнений коленного сустава.

Наколенник надевается на коленный сустав, создавая мягкую эластичную оболочку, при этом шов располагают справа, либо слева от чашечки сустава.

Наколенник производится из полушерстяной и (или) хлопчатобумажной пряжи и изготавливается 4-х размеров.

Размер изделия подбирают по обхвату колена согласно таблице 1.

Таблица 1.

Размер изделия	Обхват колена, см
1	28-32
2	32-36
3	36-40
4	40-45

Стирать наколенник необходимо в ненасыщенном мыльном растворе (10г. мягкого моющего средства на 200 см. куб. воды) при температуре не более 40 град. Цельсия в течении 10-ти минут в режиме свободного полоскания без сильного трения и выкручивания. Полоскать изделие следует в объеме воды не менее 5000 см.куб. при температуре не более 20 град. Цельсия. Отжимать не выкручивая, сушить раскладывая на горизонтальной поверхности вдали от источников тепла. Не гладить.

Разработал:
Шендеров И.М.