

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «АБС-МЕД»

 Джнин Г.И.
«30» мая 2009 г.



ИНСТРУКЦИЯ

по применению изделия «Бинт медицинский эластичный вязаный»

Бинт медицинский эластичный вязаный, предназначен для профилактики и лечения хронической венозной недостаточности, тромбозов в до и послеоперационный период, травматических отеков, посттравматических осложнений, удержания эндопротезов в стабильном состоянии при пластических операциях.

Бинт фиксируется на конечностях больного путем последовательного кольцеобразного накручивания изделия (схема наложения бинта указана на этикетке – вкладыше), при этом последний виток фиксируется при помощи металлических клипс, состоящих из двух замков, соединенных между собой отрезком бельевой резинки.

Бинт изготавливается разной длины и ширины из хлопчатобумажной пряжи и имеет среднюю растяжимость. Ширина бинта составляет 0,08 м., 0,1 м., 0,12 м. и длина бинта – от 0,6 м. до 5,0 м. Размер изделия обозначается на этикетке-вкладыше в упаковке. Бинт не вызывает аллергических и других побочных эффектов при контакте с кожей больного.

Изделие не рекомендуется использовать при местных заболеваниях кожи пациента, а так же при индивидуальной непереносимости.

Стирать бинт необходимо в ненасыщенном мыльном растворе (10 г. мягкого моющего средства на 200 см. куб. воды) при температуре не более 40 град. Цельсия в течение 10-ти минут в режиме свободного полоскания без сильного трения и выкручивания. Полощут изделие в объеме воды не менее 3000 см. куб. при температуре не более 20 град. Цельсия. Отжимать не выкручивая, сушить - раскладывая на горизонтальной поверхности вдали от источников тепла. Не гладить.

Хранить изделие следует в скатанном виде при комнатной температуре, при этом первичная упаковка удаляется.

Гарантийный срок использования 12 месяцев.

Гарантийный срок хранения 36 месяцев.