


Фотографические изображения общего вида
 «Набор реагентов для выявления антигена SARS-CoV-2 в назальных мазках человека, серии 001, 002, 003, 004, 005» Covid-19 Антиген Экспресс-Тест Covifix
 Комплект 1, серия 001 от 2022.01., срок годности до 2024.01.



Covid-19 Антиген Экспресс-Тест **Covifix**

КОМПЛЕКТАЦИЯ

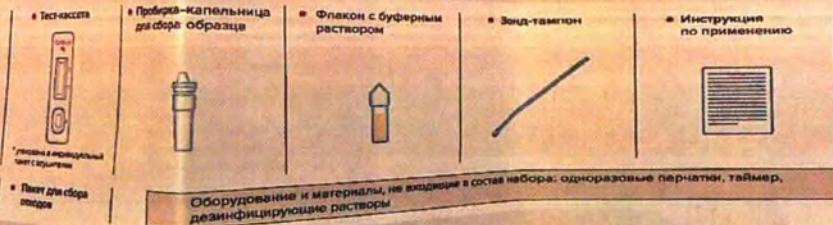




ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ АНАЛИЗА

Необходимо довести все компоненты набора до комнатной температуры (от +18 °C до +30 °C)

Очистите носовой вход от избытков слизи


ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ /СБОР ОБРАЗЦОВ ИЗ НОВОГО ХОДА/

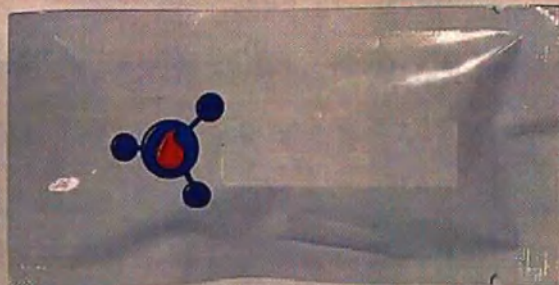

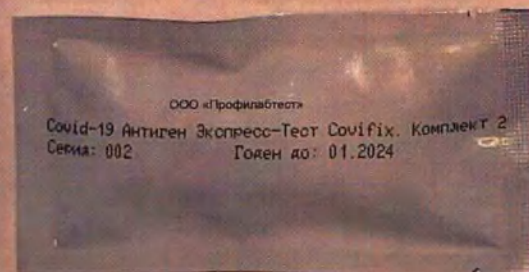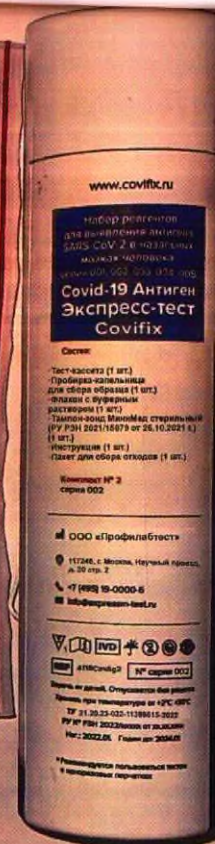

Covid-19 Антиген Экспресс-Тест **Covifix**

КОМПЛЕКТАЦИЯ

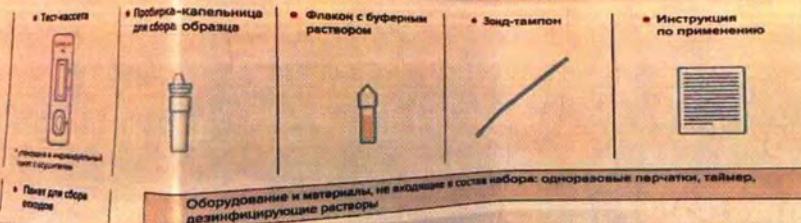


ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ АНАЛИЗА

Необходимо довести все компоненты набора до комнатной температуры (от +18 °C до +30 °C)

Очистите носовой вход от избытков слизи

ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ / СБОР ОБРАЗЦОВ ИЗ НОВОГО ХОДА

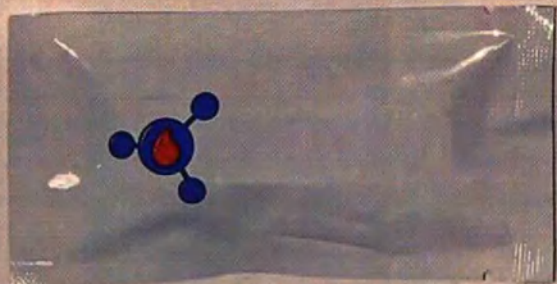



Covid-19 Антиген Экспресс-Тест **Covifix**



КОМПЛЕКТАЦИЯ

• Тест-кассета



Упакован в индивидуальную
тест-кассету

• Пакет для сбора
отверде

• Пробирка-капельница
для сбора образца



• Флакон с буферным
раствором



• Зонд-тампон



• Инструкция
по применению




Оборудование и материалы, не входящие в состав набора: одноразовые перчатки, таймер,
дезинфицирующие растворы

ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ АНАЛИЗА

■ Необходимо довести все компоненты набора
до комнатной температуры (от +18 °C до +30 °C)

■ Очистите носовой ход от избытков слизи

ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ /СБОР ОБРАЗЦОВ ИЗ НОВОГО ХОДА/

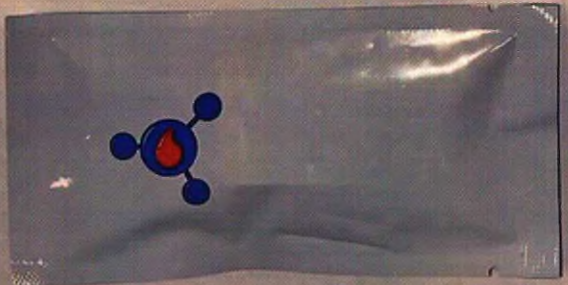

www.covifix.ru

Covid-19 Антиген Экспресс-Тест **Covifix** для самотестирования



Точность


99%







КОМПЛЕКТАЦИЯ

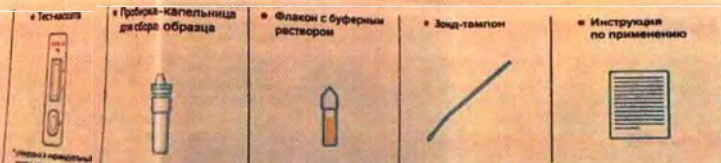

План для сбора образца

Оборудование и материалы, не входящие в состав набора: одноразовые перчатки, таймер, дезинфицирующие растворы


ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ АНАЛИЗА


Необходимо довести все компоненты набора до комнатной температуры (от +18 °C до +30 °C)

Очистите несвой ека от избытков слизи

ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ /СБОР ОБРАЗЦОВ ИЗ НОВОГО ХОДА/


deitalab

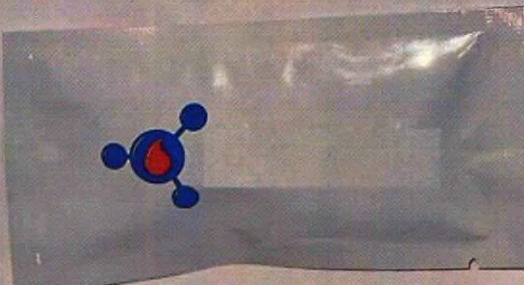

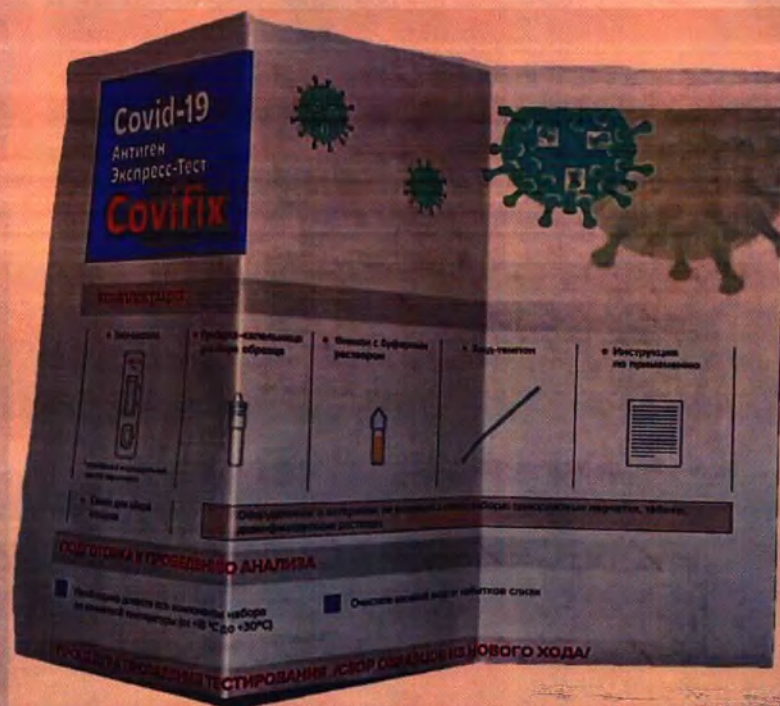

Covid-19 Антиген Экспресс-Тест **Covifix**

КОМПЛЕКТАЦИЯ

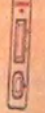• Тест-кассета  * Упомянуты в информационном листе к набору	• Пробирка-капельница для сбора образца 	• Флакон с буферным раствором 	• Зонд-тампон 	• Инструкция по применению 
---	--	--	---	---


Оборудование и материалы, не входящие в состав набора: одноразовые перчатки, таймер, дезинфицирующие растворы

ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ АНАЛИЗА

■ Необходимо довести все компоненты набора до комнатной температуры (от +18 °C до +30 °C)

■ Очистите носовую полость от остатков слизи

ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ /СБОР ОБРАЗЦОВ ИЗ НОВОГО ХОДА/

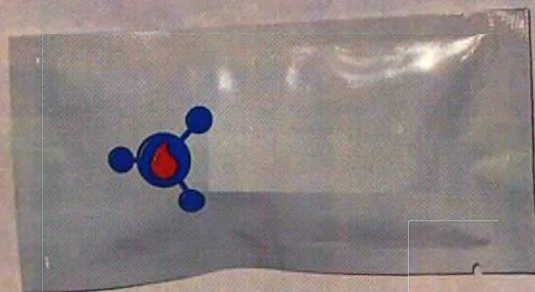

www.covifix.ru

Набор реагентов
для выявления антигена
SARS-CoV 2 в назальных
мазках человека
серии 001, 002, 003, 004, 005
**Covid-19 Антиген
Экспресс-тест
Covifix**


Состав:

• Тест-кассета (1 шт.)
• Пробирка-капельница
для сбора образца (1 шт.)
• Флакон с буферным
раствором (1 шт.)
• Палочка-тампон с ватным
наконечником стерильная
• (РУ РЗН 2015/2401 от 13.05.2021 г.) (1 шт.)
• Инструкция (1 шт.)
• Пакет для сбора отходов (1 шт.)

Комплект № 1
серия 001



☎ +7 (495) 19-0000-5
✉ info@express-test.ru

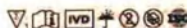

REF 4118CovAg1 № серии 001

Беречь от детей. Отпускается без рецепта.

Хранить при температуре от +2°C до +30°C

ТУ 2120-23-022-80341/80-2022

РУ № РЗН 2022/1000 от 04.05.2022

Ид. № 2022.01. Срок до: 2024.01

В Российской Федерации использование
в медицинских учреждениях

www.covifix.ru



**Covid-19
Антиген
Экспресс-Тест
Covifix**
для самотестирования



Точность
99%



Генеральный директор ООО «ПрофиЛабТест»

Киреев А.И.



Прошнуровано,
пронумеровано
и скреплено печатью

11

листов

Генеральный директор
ООО «ПРОФИЛАБТЕСТ»

Киреев А. И.

« 17 » 06



УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Профилабтест»
Киреев А.И.
«_15_» _____ 2022 г.

Комплект №1



Набор реагентов
для выявления антигена SARS-CoV-2
в назальных мазках человека,
серии 001, 002, 003, 004, 005»
Covid-19 Антиген Экспресс-Тест Covifix

Состав:

- Тест-кассета (1 шт.)
- Пробирка-капельница для сбора образца (1 шт.)
- Флакон с буферным раствором (1 шт.)
- Палочка-тампон с ватным намотом медицинская стерильная (РУ РЗН 2015/2401 от 13.05.2021 г.) (1 шт.)
- Инструкция (1 шт.)
- Пакет для сбора отходов (1 шт.)

Комплект №1

Серия 001

 **ООО «Профилабтест»**

 117246, г. Москва, Научный проезд,
д. 20 стр. 2, этаж 1 пом I часть ком 13

 +7 495-19-0000-5

 info@expressm-test.ru



REF 4118CovAg1 **№ серии 001**

Беречь от детей. Отпускается без рецепта

Хранить при температуре от +2°C до +30°C

ТУ 21.20.23-022-11399815-2022

РУ №РЗН 2022/XXXXX от XX.XX.XXXX

Изг.: 2022.01. Годен до: 2024.01.

**Рекомендуется пользоваться тестом в
одноразовых перчатках!**

Комплект №2



Набор реагентов
для выявления антигена SARS-CoV-2
в назальных мазках человека,
серии 001, 002, 003, 004, 005»
Covid-19 Антиген Экспресс-Тест Covifix

Состав:

- Тест-кассета (1 шт.)
- Пробирка-капельница для сбора образца (1 шт.)
- Флакон с буферным раствором (1 шт.)
- Тампон-зонд МиниМед стерильный (ПУ РЗН 2021/15079 от 26.10.2021 г.) (1 шт.)
- Инструкция (1 шт.)
- Пакет для сбора отходов (1 шт.)

Комплект №2
Серия 002

ООО «Профилабтест»

117246, г. Москва, Научный проезд,
д. 20 стр. 2, этаж 1 пом I часть ком 13

+7 495-19-0000-5

info@expressm-test.ru



REF 4118CovAg 2 N° серии 002

Беречь от детей. Отпускается без рецепта

Хранить при температуре от +2°C до +30°C

ТУ 21.20.23-022-11399815-2022

РУ №РЗМ 2022/XXXXX от XX.XX.XXXX

Изг.: 2022.01. Годен до: 2024.01.

Рекомендуется пользоваться тестом в
одноразовых перчатках!

Комплект №3



Набор реагентов
для выявления антигена SARS-CoV-2
в назальных мазках человека,
серии 001, 002, 003, 004, 005»
Covid-19 Антиген Экспресс-Тест Covifix

Состав:

- Тест-кассета (1 шт.)
- Пробирка-капельница для сбора образца (1 шт.)
- Флакон с буферным раствором (1 шт.)
- Зонд для отбора проб с тампоном MR без пробирки (РУ РЗН 2013/401 от 01.03.2017 г.) (1 шт.)
- Инструкция (1 шт.)
- Пакет для сбора отходов (1 шт.)

Комплект №3
Серия 003

ООО «Профилабтест»

117246, г. Москва, Научный проезд,
д. 20 стр. 2, этаж 1 пом I часть ком 13

+7 495-19-0000-5

info@expressm-test.ru



REF 4118CovAg 3 № серия 003

Беречь от детей. Отпускается без рецепта

Хранить при температуре от +2°C до +30°C

ТУ 21.20.23-022-11399815-2022

РУ №РЗН 2022/XXXXX от XX.XX.XXXX

Изг.: 2022.01. Годен до: 2024.01.

Рекомендуется пользоваться тестом в
одноразовых перчатках!

Комплект №4



Набор реагентов
для выявления антигена SARS-CoV-2
в назальных мазках человека,
серии 001, 002, 003, 004, 005»
Covid-19 Антиген Экспресс-Тест Covifix

Состав:

- Тест-кассета (1 шт.)
- Пробирка-капельница для сбора образца (1 шт.)
- Флакон с буферным раствором (1 шт.)
- Зонд-тампон для отбора, транспортировки и хранения биологических проб (РУ ФСЗ 2009/05516 от 19.08.2015 г.)(1 шт.)
- Инструкция (1 шт.)
- Пакет для сбора отходов (1 шт.)


Комплект №4
Серия 004

ООО «Профилабтест»

📍 117246, г. Москва, Научный проезд,
д. 20 стр. 2, этаж 1 пом I часть ком 13

☎ +7 495-19-0000-5

✉ Info@expressm-test.ru

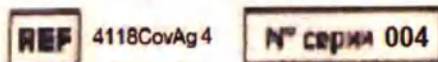

Беречь от детей. Отпускается без рецепта

Хранить при температуре от +2°C до +30°C

ТУ 21.20.23-022-11399815-2022

РУ №РЗН 2022/XXXXX от XX.XX.XXXX

Изг.: 2022.01. Годен до: 2024.01.

**Рекомендуется пользоваться тестом в
одноразовых перчатках!**

Комплект №5



Набор реагентов
для выявления антигена SARS-CoV-2
в назальных мазках человека,
серии 001, 002, 003, 004, 005»
Covid-19 Антиген Экспресс-Тест Covifix

Состав:

- Тест-кассета (1 шт.)
- Пробирка-капельница для сбора образца (1 шт.)
- Флакон с буферным раствором (1 шт.)
- Зонд-тампон для отбора, транспортировки и хранения биологических проб, стерильный (ПУ ФСЗ 2012/11835 от 29.03.2012 г.) (1 шт.)
- Инструкция (1 шт.)
- Пакет для сбора отходов (1 шт.)

Комплект №5
Серия 005

ООО «Профилабтест»


117246, г. Москва, Научный проезд,
д. 20 стр. 2, этаж 1 пом I часть ком 13

+7 495-19-0000-5

info@expressm-test.ru



4118CovAg5

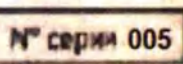

Беречь от детей. Отпускается без рецепта

Хранить при температуре от +2°C до +30°C

ТУ 21.20.23-022-11399815-2022

РУ №РЗН 2022/XXXXX от XX.XX.XXXX

Изг.: 2022.01. Годен до: 2024.01.

Рекомендуется пользоваться тестом в
одноразовых перчатках!

Начальник производства

Начальник отдела контроля качества

 А.А. Ивчин
 М.А. Лесняк



Прошнуровано,
пронумеровано
и скреплено печатью

10 листов

Генеральный директор
ООО «ПРОФИЛАБТЕСТ»

Киреев А. И.

« 17 » 06 2022 г.

