

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «Б.Браун Авитум Руссланд»



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Бикарбонатный картридж Sol-Cart В/ Сол-Карт Б

Соответствует требованиям национальных стандартов
ГОСТ Р 50444-92, ГОСТ Р 26161-89, ГОСТ Р 50267.0-92

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Бикарбонатный картридж Sol-Cart B/ Сол- Карт Б

1. Внимательно осмотрите внешнюю упаковку картриджа на предмет повреждений.
2. Проверьте соответствие срока годности.
3. Надорвите и снимите внешнюю упаковку.
4. Вставьте картридж в держатель аппарата «искусственная почка».
5. Выберите в меню аппарата режим работы с картриджем.
6. Введите параметры диализного раствора, либо используйте параметры «по умолчанию».
7. Активируйте режим «лечение».
8. По окончании режима лечения переведите аппарат в режим промывки.

Внимание! Промывка аппарата и удаление остатков диализного раствора из гидросистемы аппарата обязательна, поскольку в противном случае возможно образование нерастворимого осадка и выход аппарата из строя.

При работе с бикарбонатными картриджами обязательна регулярная горячая промывка аппарата раствором лимонной кислоты или дезинфекция перуксусной кислотой.

Генеральный директор
(должность)



С. Тйаги
(И.О. Фамилия)