


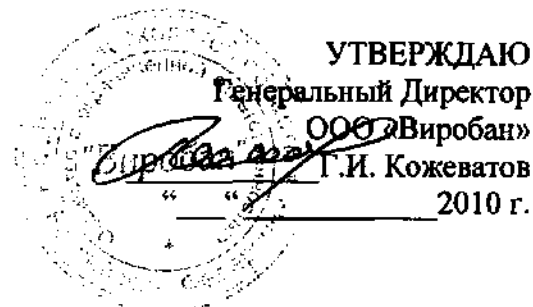

Руководство по эксплуатации Трубка эндотрахеальная с манжетой

Назначение

Предназначены для осуществления кратковременной и/или длительной (не более 30 суток) искусственной вентиляции легких, вспомогательной вентиляции, самостоятельного дыхания пациента, для проведения ингаляционного наркоза, использовать в условиях клиник и больниц, в службе скорой помощи.

Внимание!

- Соблюдать правила асептики.
- Не применять при загрязнении и нарушении целостности потребительской тары.
- Однократного применения.
- Повторной стерилизации не подлежит.
- Беречь от влаги и высоких температур.
- Выдерживать не менее 24 часов при нормальных климатических условиях после транспортировки в условиях отрицательных температур.
- Утилизировать после использования.
- Не использовать острые и режущие предметы во время интубации. Избегать контакта манжеты (6) с зубами пациента, во избежание повреждения манжеты (6) или/и трубки (2).
- Проверять проходимость эндотрахеальной трубки, при необходимости отсасывать мокроты из ее просвета. Заменять ее в случае плохой проходимости дыхательных путей пациента.


Внимание! Срок использования одной трубки не более 30 суток!

- Периодически контролировать давление в манжете (6) и приводить его к норме (п.9.2.), так как во время анестезии закись азота может диффундировать внутрь манжеты (6), вызывая увеличение или уменьшение давления в манжете (6).

Внимание! Не определять соответствие диаметра раздутой манжеты (6) объему введенного воздуха или уровню сопротивления воздуха в контрольном баллоне (4)!

- Не применять аэрозоль Лидокаина без опыта работы с ним во избежание образования точечных отверстий в манжете и утечке из нее воздуха.
- Не обрезать трубку интубационную (2) вблизи ее соединения с трубкой присоединительной (5) линии раздувания во избежание течи в линии раздувания.
- Не использовать смазку для введения 15-ти миллиметрового коннектора в трубку во избежание разъединения.
- Проверять правильность положения трубки эндотрахеальной при любом изменении положения тела пациента или самой трубки после интубации.
- Избегать контакта трубки с электрохирургическими электродами и лазерными пучками во избежание точечных испарений или загорания ПВХ в среде, обогащенной кислородом.
- Удалять весь воздух из манжеты перед извлечением эндотрахеальной трубки для предупреждения травмирования трахеи или голосовых связок.

6

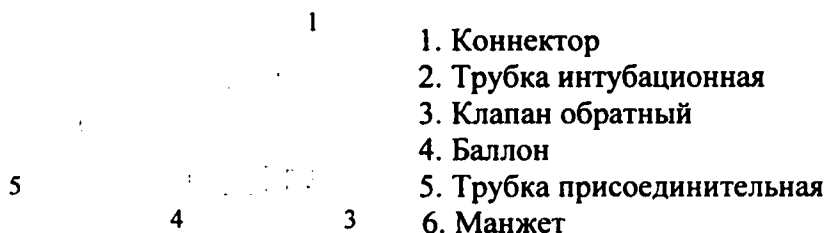

1. Коннектор
2. Трубка интубационная
3. Клапан обратный
4. Баллон
5. Трубка присоединительная
6. Манжет

Порядок применения

1. Извлечь стерильную эндотрахеальную трубку из пакета.
2. Проверить целостность манжеты и функционирование системы раздувания манжеты. Для чего наполнить шприц воздухом, соединить его с клапаном (3) и раздуть манжету (6). Проверить давление в манжете (не более 25 см водного столба). Сдуть манжету полностью.

Внимание! В случае обнаружения утечки воздуха или отказа системы раздувания манжеты трубку не использовать!

3. Открыть рот пациента правой рукой.
4. Взять ларингоскоп в левую руку и ввести его клинок в правый угол рта пациента, сместив его язык влево.
5. Провести клинок ларингоскопа вперед по средней линии, делая тракцию по оси рукоятки ларингоскопа, осмотреть рот больного, язычок, глотку и надгортанник.
6. Осмотреть черпаловидные хрящи, вход в гортань и голосовые связки, подняв надгортанник клинком ларингоскопа.
7. Ввести эндотрахеальную трубку с проводником правой рукой через правый угол рта пациента так, чтобы манжетка расположилась за голосовыми связками.

8. Извлечь проводник.

9. Начать вентиляцию легких:

- 9.1. Извлечь ларингоскоп;
- 9.2. Раздуть манжету (6) с помощью устройства для ее раздувания с целью достижения герметичности;

Внимание! Отсоединить устройство для раздувания от клапана (3) сразу после его использования!

- 9.3. Зафиксировать трубку с помощью завязки или лейкопластыря.

РУ

141981 г. Дубна Московская область
ул. Приборостроителей, 3а
Тел: (49621) 28861, 28862



Виробан

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный Директор

ООО «Виробан»

Г.И. Кожеватов

2010 г.

Руководство по эксплуатации Трубка эндотрахеальная

Назначение

Предназначены для осуществления кратковременной и/или длительной (не более 30 суток) искусственной вентиляции легких, вспомогательной вентиляции, самостоятельного дыхания пациента, для проведения ингаляционного наркоза, использовать в условиях клиник и больниц, в службе скорой помощи.

Внимание!

- Соблюдать правила асептики.
- Не применять при загрязнении и нарушении целостности потребительской тары.
- Однократного применения.
- Повторной стерилизации не подлежит.
- Беречь от влаги и высоких температур.
- Выдержать не менее 24 часов при нормальных климатических условиях после транспортировки в условиях отрицательных температур.
- Утилизировать после использования.
- Не использовать острые и режущие предметы во время интубации.
- Проверять проходимость эндотрахеальной трубки, при необходимости отсасывать мокроты из ее просвета. Заменять ее в случае плохой проходимости дыхательных путей пациента.

Внимание! Срок использования одной трубки не более 30 суток!

- Проверять правильность положения трубки эндотрахеальной при любом изменении положения тела пациента или самой трубки после интубации.
- Избегать контакта трубки с электрохирургическими электродами и лазерными пучками во избежание точечных испарений или загорания ПВХ в среде, обогащенной кислородом.

2

1. Коннектор
2. Трубка интубационная

Порядок применения

1. Извлечь стерильную эндотрахеальную трубку из пакета.
2. Открыть рот пациента правой рукой.
3. Взять ларингоскоп в левую руку и ввести его клинок в правый угол рта пациента, сместив его язык влево.
4. Провести клинок ларингоскопа вперед по средней линии, делая тракцию по оси рукоятки ларингоскопа, осмотреть рот больного, язычок, глотку и надгортанник.
5. Осмотреть черпаловидные хрящи, вход в гортань и голосовые связки, подняв надгортанник клинком ларингоскопа.
6. Ввести эндотрахеальную трубку с проводником правой рукой через правый угол рта пациента так, чтобы манжетка расположилась за голосовыми связками.
7. Извлечь проводник.
8. Начать вентиляцию легких:
 - 8.1. Извлечь ларингоскоп;
 - 8.2. Зафиксировать трубку с помощью завязки или лейкопластыря.

РУ

141981 г. Дубна Московская область, ул. Приборостроителей, 3а, Тел: (49621) 28861, 28862