



Виробан

Инструкция по применению «Перчатки хирургические латексные стерильные»

Описание и назначение.

Перчатки хирургические латексные стерильные однократного применения (далее - перчатки) предназначены для защиты пациента и медицинского работника от взаимного заражения во время хирургического вмешательства.

Перчатки предназначены для использования в условиях клиник и больниц, в лечебных учреждениях, в службе скорой помощи.

Перчатки используют при контакте со слизистыми оболочками или поврежденной кожей, а так же при работе с кровью или другими биологическими жидкостями. При необходимости, можно использовать дополнительную пару перчаток, что уменьшает частоту повреждений при работе с острыми инструментами.

Упакованные перчатки должны храниться в помещении при температуре от 0 до 25°C и относительной влажности воздуха не выше 85%.

Порядок работы с перчатками.

1. Взять упаковку с перчатками нужного размера.
2. Перед началом работы необходимо убедиться в целостности упаковки.
3. Вскрыть упаковку, достать внутренний пакет с перчатками.
4. Достать перчатки из внутреннего пакета, расправить.
5. Надеть перчатки перед работой.
6. Удалить опудривающее вещество стерильной влажной губкой, салфеткой или другим эффективным способом.
7. После работы снять перчатки, осторожно, стараясь избегать загрязнения кожи рук.

Внимание!

- Не использовать при нарушении целостности пакета потребительской тары.
- Однократного применения.
- Повторному использованию и стерилизации не подлежит.

ООО «ВИРОБАН» Россия, 141980, Московская обл., г.Дубна, Ул.Приборостроителей, 3а
Тел./факс (49621)2 88 61,2 88 62,2 88 63, (495)745 70 31;Факс(49621)2 90 22
e-mail: viroban@dubna.ru, <http://www.viroban.ru>



Генеральный директор

Г.И. Кожеватов