



Производитель:

«A.B. Dental Devices Ltd.», Израиль
Адрес: 19 Hayahalomim st., Ashdod, Israel
Телефон: +972-8-8531388
Факс: +972-8522562
Сайт: <http://www.ab-dent.com/>

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО
ИЗДЕЛИЯ**

**Ортопедические элементы вспомогательные для
дентальной имплантации и зубного
протезирования, в наборах и
отдельных упаковках для имплантатов
A.B. Dental Devices Ltd.**

Офра Бар-Шалом
Генеральный Директор
A.B. Dental Devices Ltd.

א.ב.י. דנטל דיוויז בע"מ
A.B. DENTAL DEVICES LTD

Ортопедические элементы вспомогательные для дентальной имплантации и зубного протезирования предназначены для установки на имплантат с целью частичного или полного протезирования зубов и восстановления зубного ряда человека.

Область применения – ортопедическая стоматология.

Показания к применению МИ:

- потеря одного зуба
- замена краевого дефекта
- полная потеря зубов
- стабилизация съемной пластинки

Противопоказания:

Общие противопоказания:

- сердечнососудистые заболевания, связанные с высоким риском затяжного септического эндокардита; коронарная недостаточность;
- дискразия крови;
- иммунодефицит, СПИД;
- раковые заболевания;
- радиоактивное облучение в лицевой области за последние пять лет;
- респираторные заболевания;
- заболевания щитовидной или паращитовидной железы;
- пациенты с узелковыми образованиями или шишками неизвестного происхождения в области головы или шеи;
- нарушения обмена веществ в костной ткани;
- диабет;
- артериальная гипертензия выше 170/110 мм рт. ст.;
- злоупотребление наркотиками и алкоголем, алкоголизм;
- гиперчувствительность к титану;
- пациенты, принимающие кортикостероиды, антикоагулянты, антиконвульсанты и иммунодепрессанты;
- пациенты с атипичными значениями содержания креатина, мочевины или кальция в сыворотке крови;
- гемофилия;
- гранулоцитопения;
- применение стероидов;
- профилактический прием антибиотиков;
- синдром Элерса-Данлоса;
- почечная недостаточность;
- трансплантация органов;
- фиброзная дисплазия.

Относительные противопоказания:

- легкие психологические расстройства;
- агрессия;
- курение;
- использование жевательного табака;
- недостаточная квалификация врача;
- недостаточная мотивация пациента.

Временные противопоказания:

- кормящие и беременные женщины;
- дети с недоразвитыми костями.

Местные противопоказания:

- недостаточная масса кости;
- остаточные инфекции и воспаления, возникающие вокруг имплантата;
- Плохая гигиена полости рта;
- гиперчувствительность к компонентам имплантата;
- пародонтит;
- нереалистичные ожидания пациента.

Возможные побочные эффекты при применении МИ:

Методики выполнения хирургических операций и реставраций, которые требуют надлежащего использования данных устройств, представляют собой узкоспециализированные и сложные процедуры. Неверное выполнение манипуляций может привести к отторжению (неприживлению) имплантата, потере поддерживающей зубы кости (остеопороз), перелому реставрации, ослаблению винта и проникновению инородных тел при вдохе в дыхательные пути (аспирация).

Также возможны другие побочные эффекты:

- индивидуальная аллергическая непереносимость компонентов;
- отторжение имплантата;
- остеопороз;
- инфицирование;
- местная или системная бактериальная инфекция;
- аспирация мелких частей;
- задержка заживления;
- отечность;
- кровотечение;
- расхождение краев раны;
- парестезия;
- гематома;
- перфорация синуса;
- повреждение нерва;
- проблемы с речью;
- гингивит;
- гиперплазия;
- эндокардит;
- долгая боль;
- трещины в кости, имплантате или зубах.

Следующие органы и системы могут пострадать:

сердечно-сосудистая – коронарная болезнь сердца, аритмия;

респираторная – хроническая болезнь легких;

почечная – хроническая почечная недостаточность;

эндокринная – диабет, болезни щитовидной железы, нарушения гипофиза и надпочечников;

гематологическая – анемия, лейкомия, нарушения свертываемости крови;

скелетно-мышечная – артрит, остеопороз;

неврологическая – удар, паралич, умственная отсталость.

Предварительное обследование пациента:

• Перед имплантацией следует провести стандартное обследование пациента врачом общей практики, чтобы выявить чувствительность к материалам, применяемым в челюстно-лицевой хирургии, определить общее состояние здоровья пациента и отсутствие у него противопоказаний для стоматологической операции.

• Пациент должен иметь подходящую ширину альвеолярной кости, чтобы осуществлялась адекватная поддержка имплантата (минимум 1 мм циркулярный размер и 2 мм апикальный). Достаточный объем и качество кости, необходимые для установки имплантата, можно определить при помощи радиологических данных.

• Перед имплантацией следует провести тщательную оценку следующих параметров места под имплантат: расположение жизненно важных сосудов, расположение нервов, объем гайморовой пазухи и мягких тканей.

• План обследования пациента должен включать в себя:

- общее обследование пациента у врача общей практики;
- изучение анамнеза;
- клиническое исследование гигиены зубов пациента, окклюзии, пародонта;
- компьютерная томография челюсти
- рентген полости рта, и т.д.

Условия безопасного применения и меры предосторожности:

• Эти изделия или устройства могут использоваться только обученными надлежащим образом, сертифицированными и опытными стоматологами.

• Все представленные изделия являются изделиями однократного применения. Повторное применение не допустимо.

• Изделия поставляются в не стерильном виде, промаркированные надписью «Не стерильно». Изделия, предназначенные для интраорального применения должны перед использованием пройти процедуру очистки, дезинфекции и стерилизации.

• Все представленные медицинские изделия предназначены для использования только по назначению врача.

• Установка имплантатов должна производиться только хирургическими инструментами «A.B. Dental Devices», которые дополняют каждый имплантат, в противном случае, производитель не несет ответственности за качество установки имплантата.

• Использование любого имплантата не требует проведение нестандартной профилактики антибиотиками перед операцией.

• В случае неожиданной боли следует немедленно связаться с хирургом.

• При проведении операции следует избегать физического напряжения.


• Пациентов следует проинформировать, что имплантат является металлическим устройством и может повлиять на работу аппарата МРТ.

Техническое описание, параметры и характеристики МИ

Формирователь десны P0

Формирователь десны устанавливается в имплантат при двухэтапном протезировании и используется для закрытия платформы имплантата для предотвращения прорастания кости и мягкой ткани внутрь имплантата на период остеоинтеграции. Формирователь десны остаётся в нём до тех пор, пока не сформируется десневой край вокруг имплантата. Он предназначен для того, чтобы подготовить место для установки ортопедической конструкции. Поставляются формирователи десны трёх размеров: стандартные, узкие и широкие. Выбор высоты

формирователя десны определяется толщиной десны. Чтобы обеспечить лёгкое извлечение формирователя десны из имплантата, был разработан двухэтапный формирователь десны P0/2. Он устанавливается в имплантат и закрепляется в нём с помощью винта. P0/2 имеет 2 компонента (формирователь десны и винт). Стандартные формирователи десны поставляются 6 видов (высота 2,3,4,5,6,7 мм), а также широкие формирователи десны.

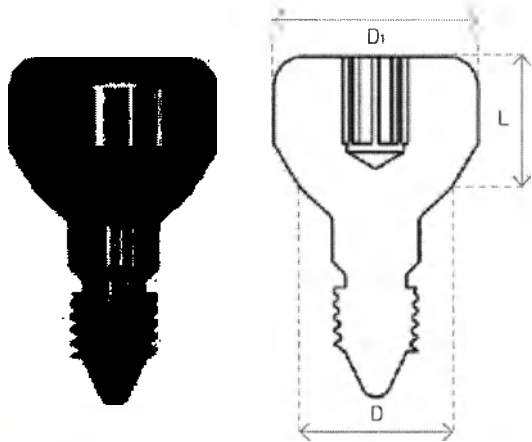

P0 Формирователь десны титановый						
	P0-3.75,2	P0-3.75,3	P0-3.75,4	P0-3.75,5	P0-3.75,6	P0-3.75,7
P0N Формирователь десны узкий титановый						
	P0N-3.75,3	P0N-3.75,4	P0N-3.75,5	P0N-3.75,6	P0N-3.75,7	
P0W Формирователь десны широкий титановый						
	P0W-3.75,2	P0W-3.75,3	P0W-3.75,4	P0W-3.75,5	P0W-3.75,6	

Здесь и далее допуск всех представленных линейных размеров $\pm 0,05$ мм, весовых характеристик $\pm 0,0005$ г.

Номер по каталогу	Описание	Диаметр, D (мм)	Диаметр, D1 (мм)	Угол, а (°)	Длина L (мм)	Длина LS (мм)	Длина LS1 (мм)	Вес (г)
P0/2-3.75,2	Формирователь десны титановый	3,5	4,50	-	2,00	-	-	0,11
P0/2-3.75,3	Формирователь десны титановый	3,5	4,50	-	3,00	-	-	0,15
P0/2-3.75,4	Формирователь десны титановый	3,5	4,50	-	4,00	-	-	0,19
P0/2-3.75,5	Формирователь десны титановый	3,5	4,50	-	5,00	-	-	0,24
P0/2-3.75,6	Формирователь десны титановый	3,5	4,50	-	6,00	-	-	0,30
P0/2-3.75,7	Формирователь десны титановый	3,5	4,50	-	7,00	-	-	0,34
P0-3,2	Формирователь десны титановый	2,8	4,20	-	2,00	-	-	0,90
P0-3,3	Формирователь десны титановый	2,8	4,20	-	3,00	-	-	0,13

P0-3,4	Формирователь десны титановый	2,8	4,20	-	4,00	-	-	0,15
P0-3,5	Формирователь десны титановый	2,8	4,20	-	5,00	-	-	0,16
P0-3,6	Формирователь десны титановый	2,8	4,20	-	6,00	-	-	0,18
P0-3,7	Формирователь десны титановый	2,8	4,20	-	7,00	-	-	0,20
P0-3.75,0.5	Формирователь десны титановый	3,5	4,00	-	0,50	-	-	0,10
P0-3.75,2	Формирователь десны титановый	3,5	4,70	-	2,00	-	-	0,13
P0-3.75,3	Формирователь десны титановый	3,5	4,70	-	3,00	-	-	0,17
P0-3.75,4	Формирователь десны титановый	3,5	4,70	-	4,00	-	-	0,22
P0-3.75,5	Формирователь десны титановый	3,5	4,70	-	5,00	-	-	0,28
P0-3.75,6	Формирователь десны титановый	3,5	4,70	-	6,00	-	-	0,35
P0-3.75,7	Формирователь десны титановый	3,5	4,70	-	7,00	-	-	0,40
P0-4.5,3	Формирователь десны титановый	4,5	4,70	-	3,00	-	-	0,15
P0-4.5,5	Формирователь десны титановый	4,5	4,70	-	5,00	-	-	0,23
P0-4.5,7	Формирователь десны титановый	4,5	4,70	-	7,00	-	-	0,30
P0C-3,2	Формирователь десны титановый с конической платформой	2,8	4,20	-	2,00	-	-	0,10
P0C-3,3	Формирователь десны титановый с конической платформой	2,8	4,20	-	3,00	-	-	0,13
P0C-3,4	Формирователь десны титановый с конической платформой	2,8	4,20	-	4,00	-	-	0,16
P0C-3,5	Формирователь десны титановый с конической платформой	2,8	4,20	-	5,00	-	-	0,20
P0C-3,6	Формирователь десны титановый с конической платформой	2,8	4,20	-	6,00	-	-	0,22
P0C-3,7	Формирователь десны титановый с конической платформой	2,8	4,20	-	7,00	-	-	0,14
P0C-4,2	Формирователь десны титановый с конической платформой	3,35	4,50	-	2,00	-	-	0,14
P0C-4,3	Формирователь десны титановый с конической платформой	3,35	4,50	-	3,00	-	-	0,19
P0C-4,4	Формирователь десны титановый с конической платформой	3,35	4,50	-	5,00	-	-	0,23
P0C-4,5	Формирователь десны титановый с конической платформой	3,35	4,50	-	5,00	-	-	0,28
P0C-4,6	Формирователь десны титановый с конической платформой	3,35	4,50	-	6,00	-	-	0,36
P0C-4,7	Формирователь десны титановый с конической платформой	3,35	4,50	-	7,00	-	-	0,42


	платформой							
P0-I6B	Формирователь десны для имплантата I6B	3,2	3,40	-	3,00	-	-	0,15
P0-I6B,3	Формирователь десны для имплантата I6B	3,2	3,40	-	3,00	-	-	0,09
P0N-3.75,2	Формирователь десны узкий титановый	3,5	3,50	-	2,00	-	-	0,08
P0N-3.75,3	Формирователь десны узкий титановый	3,5	3,50	-	3,00	-	-	0,09
P0N-3.75,4	Формирователь десны узкий титановый	3,5	3,50	-	4,00	-	-	0,11
P0N-3.75,5	Формирователь десны узкий титановый	3,5	3,50	-	5,00	-	-	0,13
P0N-3.75,6	Формирователь десны узкий титановый	3,5	3,50	-	6,00	-	-	0,14
P0N-3.75,7	Формирователь десны узкий титановый	3,5	3,50	-	7,00	-	-	0,17
P0NC-3,2	Формирователь десны узкий титановый с конической платформой	2,8	3,50	-	2,00	-	-	0,09
P0NC-3,3	Формирователь десны узкий титановый с конической платформой	2,8	3,50	-	3,00	-	-	0,11
P0NC-3,4	Формирователь десны узкий титановый с конической платформой	2,8	3,50	-	4,00	-	-	0,12
P0NC-3,5	Формирователь десны узкий титановый с конической платформой	2,8	3,50	-	5,00	-	-	0,14
P0NC-3,6	Формирователь десны узкий титановый с конической платформой	2,8	3,50	-	6,00	-	-	0,16
P0NC-3,7	Формирователь десны узкий титановый с конической платформой	2,8	3,50	-	7,00	-	-	0,17
P0NC-4,2	Формирователь десны узкий титановый с конической платформой	3,35	3,50	-	2,00	-	-	0,15
P0NC-4,3	Формирователь десны узкий титановый с конической платформой	3,35	3,50	-	3,00	-	-	0,20
P0NC-4,4	Формирователь десны узкий титановый с конической платформой	3,35	3,50	-	4,00	-	-	0,25
P0NC-4,5	Формирователь десны узкий титановый с конической платформой	3,35	3,50	-	5,00	-	-	0,30
P0NC-4,6	Формирователь десны узкий титановый с конической платформой	3,35	3,50	-	6,00	-	-	0,36
P0NC-4,7	Формирователь десны узкий титановый с конической платформой	3,35	3,50	-	7,00	-	-	0,41
P0-P14,1	Формирователь десны для P14	3,5	4,50	-	1,00	-	-	0,10
P0-P14,2	Формирователь десны для P14	3,5	4,50	-	2,00	-	-	0,12
P0-P14,3,5	Формирователь десны для P14	3,5	4,50	-	3,50	-	-	0,15
P0-P14,5	Формирователь десны для P14	3,5	4,50	-	5,00	-	-	0,16
P0-P14,7	Формирователь десны для P14	3,5	4,50	-	7,00	-	-	0,22

P0-P24,3	Формирователь десны для P24	3,5	4.10*5.5	-	3,00	-	-	0,14
P0-P24,4	Формирователь десны для P24	3,5	4.10*5.5	-	4,00	-	-	0,19
P0-P24,5	Формирователь десны для P24	3,5	4.10*5.5	-	5,00	-	-	0,23
P0-P24,6	Формирователь десны для P24	3,5	4.10*5.5	-	6,00	-	-	0,28
P0-P24,7	Формирователь десны для P24	3,5	4.10*5.5	-	7,00	-	-	0,33
P0-P6H	Формирователь десны для P6H	3,5	4.10*5.5	-	5,00	-	-	0,09
P0W-3.75,2	Формирователь десны широкий титановый	3,5	6,00	-	2,00	-	-	0,16
P0W-3.75,3	Формирователь десны широкий титановый	3,5	6,00	-	3,00	-	-	0,22
P0W-3.75,4	Формирователь десны широкий титановый	3,5	6,00	-	4,00	-	-	0,27
P0W-3.75,5	Формирователь десны широкий титановый	3,5	6,00	-	5,00	-	-	0,33
P0W-3.75,6	Формирователь десны широкий титановый	3,5	6,00	-	6,00	-	-	0,38
P0W/2-3.75,3	Формирователь десны широкий титановый	3,5	6,00	-	3,00	-	-	0,20
P0W/2-3.75,4	Формирователь десны широкий титановый	3,5	6,00	-	4,00	-	-	0,30
P0W/2-3.75,5	Формирователь десны широкий титановый	3,5	6,00	-	5,00	-	-	0,38
P0W/2-3.75,6	Формирователь десны широкий титановый	3,5	6,00	-	6,00	-	-	0,49
P0W-4.5,5	Формирователь десны широкий титановый	4,5	6,00	-	5,00	-	-	0,33
P0WC-4,3	Формирователь десны широкий титановый с конической платформой	3,35	6,00	-	3,00	-	-	0,24
P0WC-4,4	Формирователь десны широкий титановый с конической платформой	3,35	6,00	-	4,00	-	-	0,30
P0WC-4,5	Формирователь десны широкий титановый с конической платформой	3,35	6,00	-	5,00	-	-	0,34
P0WC-4,6	Формирователь десны широкий титановый с конической платформой	3,35	6,00	-	6,00	-	-	0,40
PK-P0-3	Формирователь десны	3	5,70	-	5,30	-	-	0,31
PK-P0-3.75	Формирователь десны	3,5	5,70	-	5,30	-	-	0,36

10.2 Абатменты:

Абатмент необходим в дополнение к имплантату для удержания ортопедической конструкции. Он предназначен для установки одиночных коронок и мостовидных протезов. Ортопедические конструкции могут быть фиксированы к абатменту с помощью цемента, винта или аттачмента.

10.2.1 Абатмент временный P15

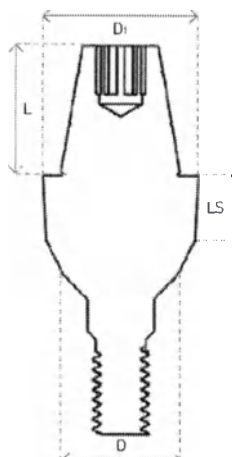

P15a-1
(жёсткий)



P15a-2
(стандартный)




P15a-3
(мягкий)

Абатмент временный для немедленной нагрузки.

Временный титановый абатмент высотой 1, 2, 3, 4, 5 и 7 мм, на котором пластиковый колпачок фиксируется путём защёлкивания. Абатмент делает возможным проведение временного протезирования без использования цемента, таким образом, предотвращая попадание цемента в зону операции. Форма абатмента также обеспечивает хорошее заживление десны, похожее на заживление с использованием формирователя десны. У абатмента нет шестигранника, что облегчает его установку.

В комплекте с абатментом поставляются 3 пластиковых колпачка трёх степеней твёрдости, от наиболее жёсткого до наиболее мягкого, которые фиксируются на абатменте путём защёлкивания.

10.2.2 Абатмент временный анатомический PEEK P3S

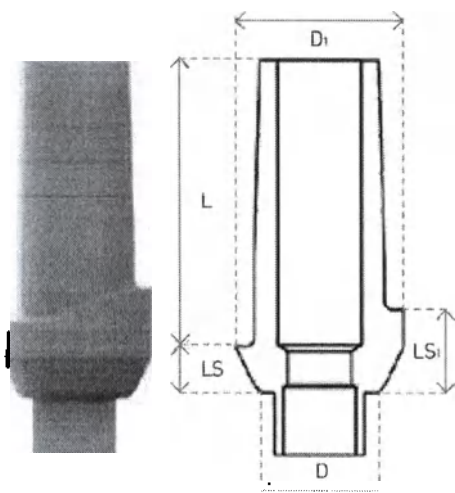

В комплекте со всеми абатментами поставляется короткий винт.





P3a

10.2.3 Абатмент временный анатомический угловой PEEK P4S


Поставляются модели с углами 15° и 25° для имплантатов, расположенных под углом.

В комплекте со всеми абатментами поставляется короткий винт

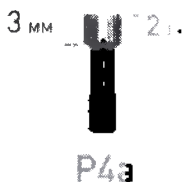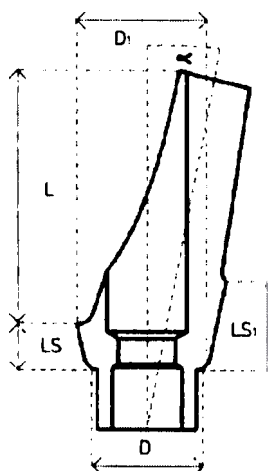

P4a


10.2.4 Абатмент беззольный пластиковый P2

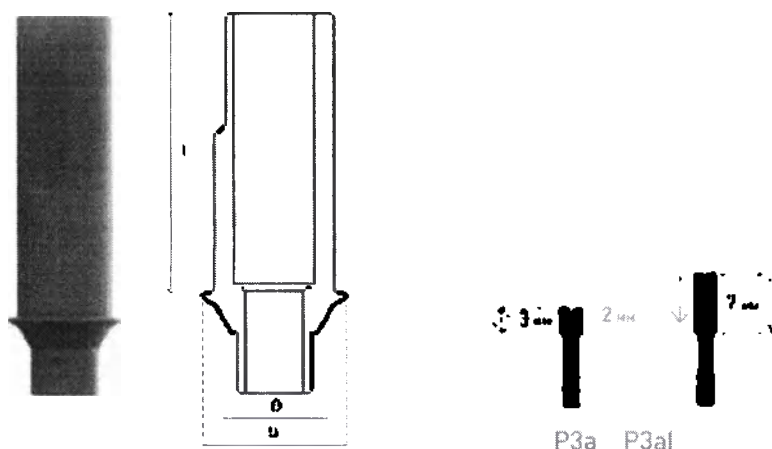

Предназначен для формообразования без внутренней резьбы. Поставляется с шестигранником или без шестигранника: С шестигранником — для создания конструкции на одном имплантате или для установки на абатменте коронки или моста. Без шестигранника — для работ на мосте, который крепится к нескольким имплантатам.

В комплекте со всеми абатментами поставляется короткий винт. Длинный винт можно заказать отдельно.


10.2.4 Абатмент пластиковый литой P9

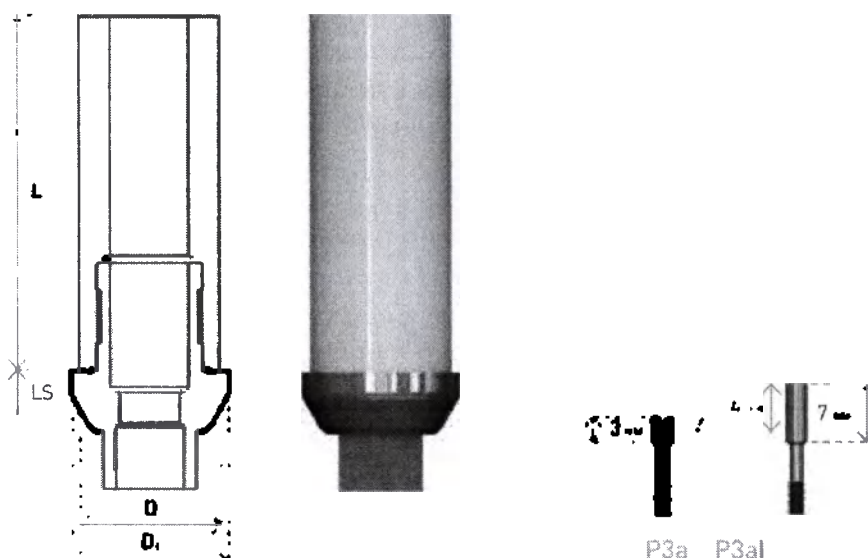

Этот абатмент точно располагается на имплантате и позволяет легко осуществить фрезеровку и литьё. Также выпускается абатмент с золотым основанием с шестигранником и без шестигранника.

В комплекте со всеми абатментами поставляется короткий винт. Длинный винт можно заказать отдельно.


10.2.5 Абатмент прямой анатомический беззольный для формообразования P2-P3S

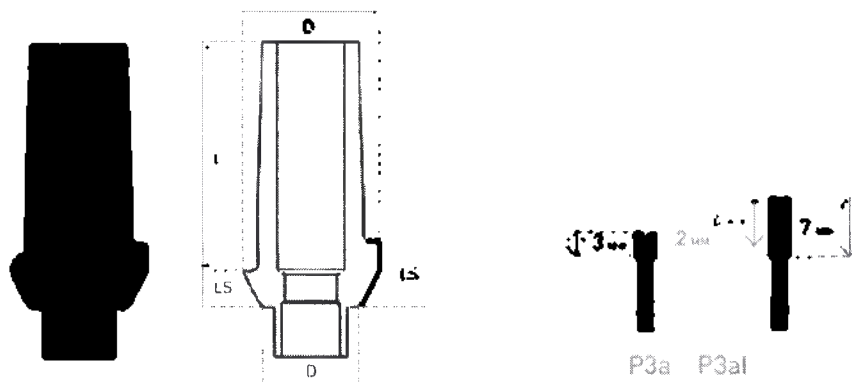


В комплекте со всеми абатментами поставляется короткий винт. Длинный винт можно заказать отдельно

10.2.6 Абатмент угловой анатомический беззольный для формообразования P2-P4S

В комплекте со всеми абатментами поставляется короткий винт.

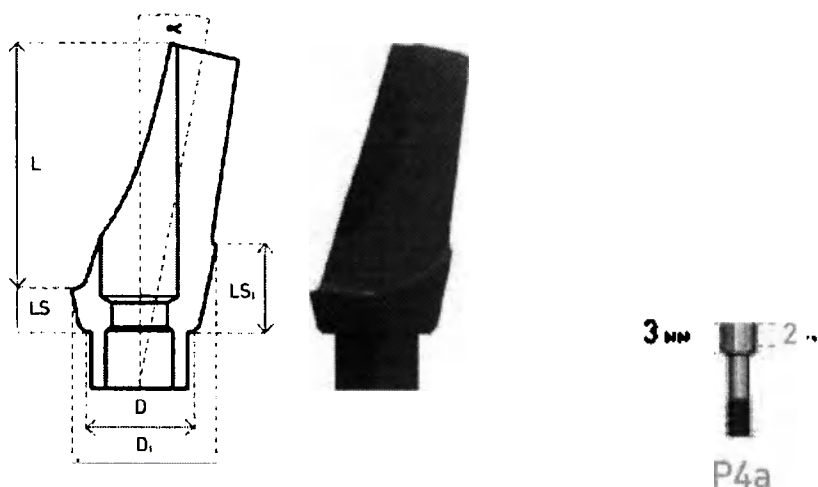

10.2.7 Абатмент антиротационный P3

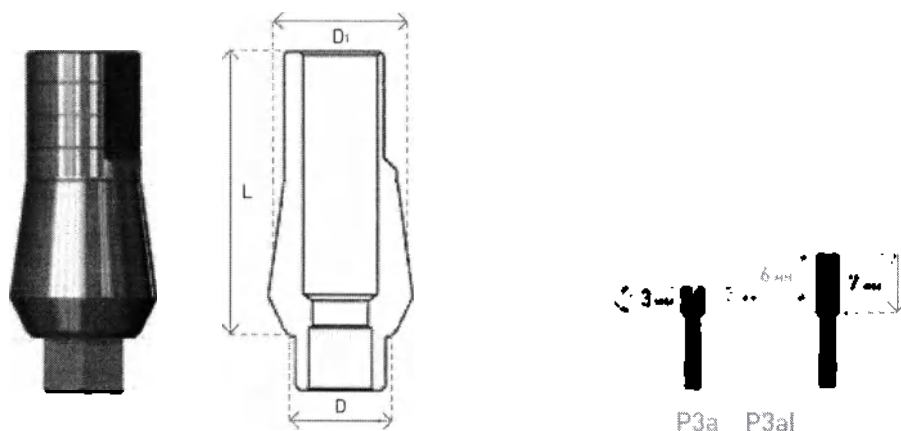

Протезирование на основе цементной фиксации

P3 — Абатмент антиротационный. Прямой титановый абатмент с шестигранником.

Разработан для постоянного протезирования.


P3N — Абатмент узкий антиротационный. Узкий титановый абатмент с шестигранником, который применяется тогда, когда пространство ограничено, например, между двумя зубами или имплантатами во фронтальном участке.

P3W — Абатмент широкий антиротационный. Широкий прямой титановый абатмент с шестигранником, который применяется в тех случаях, когда есть много пространства. Обычно используется в зоне жевательных зубов.

P3S — Абатмент анатомический антиротационный. Прямой титановый абатмент с шестигранником повторяет форму десневой линии.

В комплекте со всеми абатментами поставляется короткий винт. Длинный винт можно заказать отдельно. Абатменты высотой 12 мм (L) и выше, обычно включают в себя длинный винт

10.2.8 Абатмент угловой P4

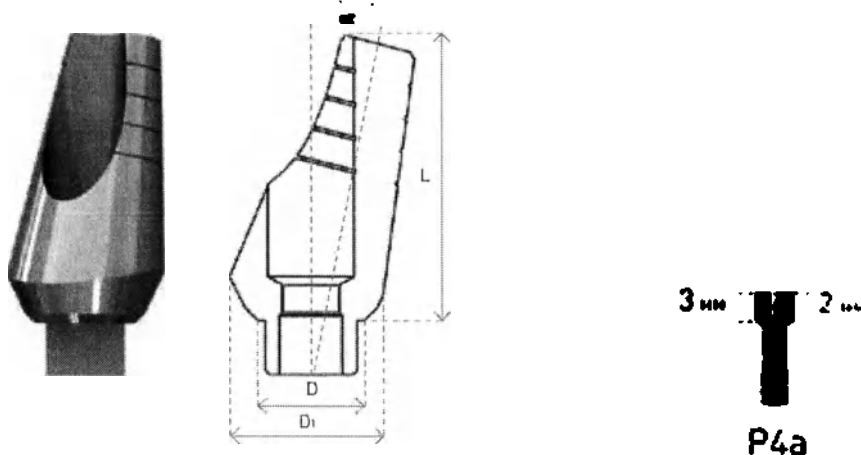


Протезирование на основе цементной фиксации

Абатмент угловой 15°, 25°, 35° и 45°, разработан для имплантатов, установленных под углом.

В комплекте со всеми абатментами поставляется винт для угловых абатментов P4a.


10.2.9 Абатмент циркониевый анатомический P3SZ

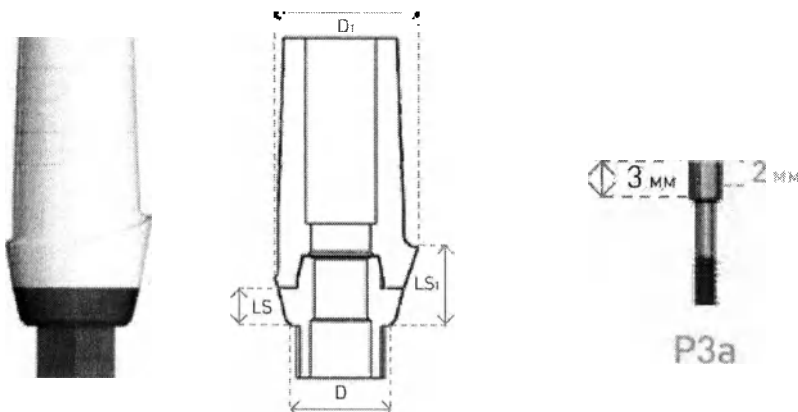

Прямой абатмент, на 99.8% состоящий из циркония с основанием из титана. Идеален для случаев, когда требуется сочетать эстетичный вид с надёжностью и прочностью.

В комплекте со всеми абатментами поставляется короткий винт.


10.2.10 Абатмент циркониевый анатомический угловой P4SZ

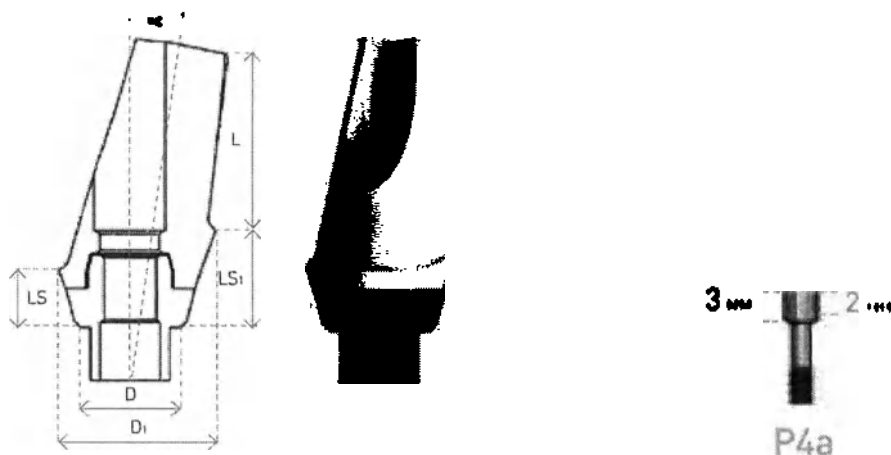

Угловой абатмент, на 99.8% состоящий из циркония, с титановым основанием. Идеален для случаев, когда требуется сочетать эстетичный вид с надёжностью и прочностью.


В комплекте со всеми абатментами поставляется винт для угловых абатментов P4a.

10.2.11 Абатмент эстетический с шестигранником P6H

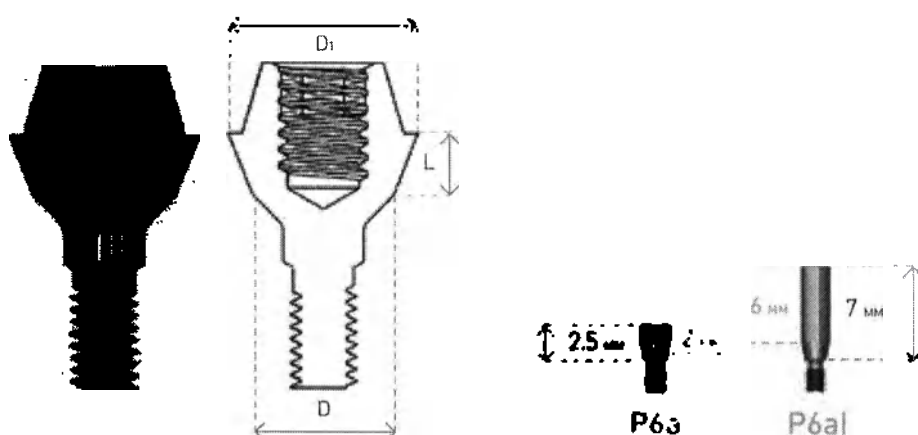

Абатмент эстетический из титана предназначен для двух или более имплантатов, когда требуется зафиксировать мост.


10.2.12 Абатмент антиротационный эстетический P7

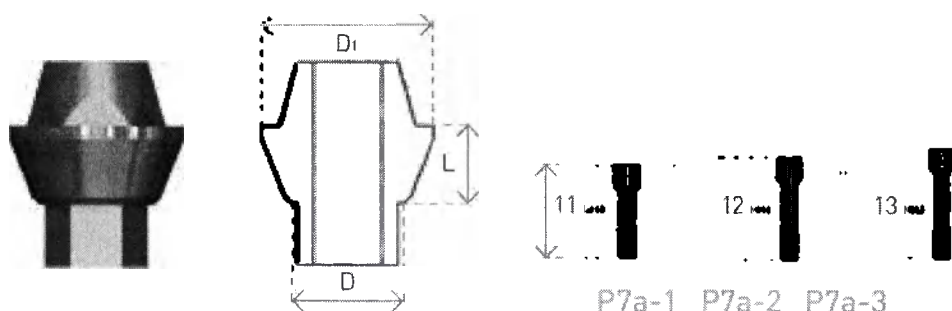

Абатмент имеет шестигранное основание с двух сторон. Предназначен для протезирования одного имплантата или моста с винтовой фиксацией на непараллельно установленных имплантатах.

Все абатменты поставляются с винтом P7-а, длина которого соответствует высоте абатмента.

10.2.13 Абатмент с плоским соединением P12:

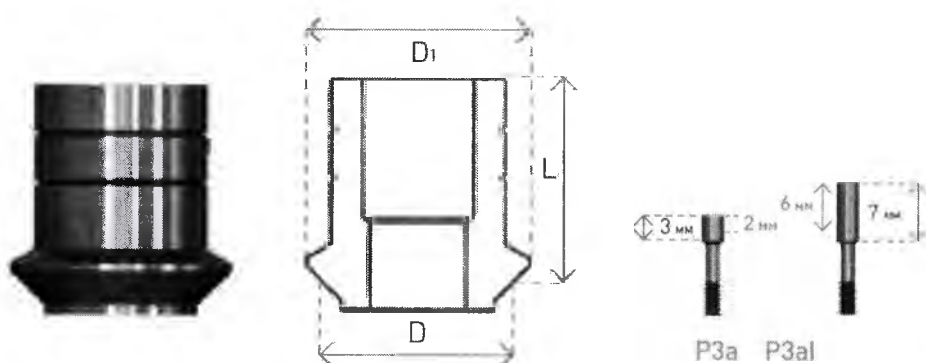

Абатмент с плоским соединением используется для винтовой фиксации и позволяет сделать протезирование даже на непараллельно установленных имплантатах и без использования шестигранника, тем самым облегчая путь введения абатмента. Абатмент P12 предоставляет собой комплексное решение для временного и постоянного протезирования, сохраняя в то же время максимальную точность. Если у используемых имплантатов нет двойной платформы, то применяется специальный адаптер, позволяющий использовать абатмент с плоским соединением. Второй функцией этого адаптера является его применение в качестве удлинителя.

Запатентованный абатмент P12 устраняет проблемы, связанные с временным и постоянным протезированием, обеспечивая при этом максимальную точность. Этот абатмент используется для протезирования на основе винтовой фиксации и позволяет провести протезирование на непараллельных имплантатах. Так как данный абатмент не имеет шестигранника, то его установка не составляет особого труда.

Номер по каталогу	Описание	Диаметр, D (мм)	Диаметр, D1 (мм)	Угол, α (°)	Длина L (мм)	Длина LS (мм)	Длина LS1 (мм)	Вес (г)
P1-3.75,13	Абатмент без шестигранника	3,5	4,50	-	3,00	-	-	0,54
P1-3.75,15	Абатмент без шестигранника	3,5	4,50	-	5,00	-	-	0,60
P1-3.75,9	Абатмент без шестигранника	3,5	4,50	-	9,00	-	-	0,37
P1-4.5,9	Абатмент без шестигранника	4,5	4,50	-	9,00	-	-	0,33
P1H-3.75,13	Абатмент без шестигранника	3,5	4,50	-	3,00	-	-	0,54
P1H-3.75,15	Абатмент без шестигранника	3,5	4,50	-	5,00	-	-	0,63
P1H-3.75,9	Абатмент без шестигранника	3,5	4,50	-	9,00	-	-	0,39
P2-3.75	Абатмент пластиковый	3,5	3,77	-	5,00	-	-	0,13
P2-4.5,9	Абатмент пластиковый	4,5	4,50	-	9,00	-	-	0,13
P2C-P3S-3,1	Абатмент прямой анатомический беззольный для формообразования с конической платформой	2,8	5,00	-	1,00	-	-	0,10
P2C-P3S-3,2	Абатмент прямой анатомический беззольный для формообразования с конической платформой	2,8	5,00	-	2,00	-	-	0,11
P2C-P3S-3,3	Абатмент прямой анатомический беззольный для формообразования с	2,8	5,00	-	3,00	-	-	0,12

	конической платформой							
P2C-P3S-4,1	Абатмент прямой анатомический беззольный для формообразования с конической платформой	3,35	5,00	-	1,00	-	-	0,10
P2C-P3S-4,2	Абатмент прямой анатомический беззольный для формообразования с конической платформой	3,35	5,00	-	2,00	-	-	0,11
P2C-P3S-4,3	Абатмент прямой анатомический беззольный для формообразования с конической платформой	3,35	5,00	-	3,00	-	-	0,12
P2C-P4S-3,15-1	Абатмент угловой анатомический беззольный для формообразования с конической платформой	2,8	4,30	15	1,00	-	-	0,09
P2C-P4S-3,25-1	Абатмент угловой анатомический беззольный для формообразования с конической платформой	2,8	4,50	25	1,00	-	-	0,10
P2C-P4S-3,25-2	Абатмент угловой анатомический беззольный для формообразования с конической платформой	2,8	4,50	25	2,00	-	-	0,11
P2C-P4S-3,25-3	Абатмент угловой анатомический беззольный для формообразования с конической платформой	2,8	4,50	25	3,00	-	-	0,11
P2C-P4S-4,15-1	Абатмент угловой анатомический беззольный для формообразования с конической платформой	3,35	4,30	15	1,00	-	-	0,13
P2C-P4S-4,15-2	Абатмент угловой анатомический беззольный для формообразования с конической платформой	3,35	4,30	15	2,00	-	-	0,13
P2C-P4S-4,15-3	Абатмент угловой анатомический беззольный для формообразования с конической платформой	3,35	4,30	15	3,00	-	-	0,14
P2C-P4S-4,25-1	Абатмент угловой анатомический беззольный для формообразования с конической платформой	3,35	4,50	25	1,00	-	-	0,14
P2C-P4S-4,25-2	Абатмент угловой анатомический беззольный для формообразования с конической платформой	3,35	4,50	25	2,00	-	-	0,15
P2C-P4S-4,25-3	Абатмент угловой анатомический	3,35	4,50	25	3,00	-	-	0,15

	беззольный для формообразования с конической платформой							
P2H- 3.75,9	Абатмент пластиковый	3,5	3,75	-	9,00	-	-	0,13
P2H-4.5,9	Абатмент пластиковый	4,5	4,50	-	9,00	-	-	0,14
P2H-I6B	Абатмент пластиковый для I6B	3,2	3,75	-	9,00	-	-	0,09
P2-I6B	Абатмент пластиковый для I6B	3,2	3,75	-	9,00	-	-	0,09
P2N-3,15	Абатмент пластиковый	2,8	4,00	-	7,75	-	-	0,12
P2N- 3.75,15	Абатмент беззольный пластиковый	3,5	4,00	-	10,80	-	-	0,16
P2NC-3,15	Абатмент беззольный пластиковый с конической платформой	2,8	3,50	-	15,00	-	-	0,12
P2NC-4,15	Абатмент беззольный пластиковый с конической платформой	3,35	3,50	-	15,00	-	-	0,13
P2NH-3,15	Абатмент пластиковый	2,8	4,00	-	7,75	-	-	0,09
P2NH- 3.75,15	Абатмент беззольный пластиковый	3,5	3,75	-	10,80	-	-	0,10
P2NHC- 3,15	Абатмент беззольный пластиковый с конической платформой	2,8	4,00	-	15,00	-	-	0,10
P2NHC- 4,15	Абатмент беззольный пластиковый с конической платформой	3,35	4,00	-	15,00	-	-	0,10
P2-P3S- 3.75,1	Абатмент прямой анатомический беззольный для формообразования	3,5	5,00	-	8,50	1,00	###	0,13
P2-P3S- 3.75,2	Абатмент прямой анатомический беззольный для формообразования	3,5	5,00	-	9,50	2,00	###	0,18
P2-P3S- 3.75,3	Абатмент прямой анатомический беззольный для формообразования	3,5	5,00	-	10,50	3,00	###	0,21
P2-P4S- 3,15-1	Абатмент угловой анатомический беззольный для формообразования	2,8	4,70	15	7,00	1,00	###	0,09
P2-P4S- 3,15-2	Абатмент угловой анатомический беззольный для формообразования	2,8	4,70	15	7,00	2,00	###	0,10
P2-P4S- 3,15-3	Абатмент угловой анатомический беззольный для формообразования	2,8	4,70	15	7,00	3,00	###	0,10
P2-P4S- 3,25-1	Абатмент угловой анатомический беззольный для формообразования	2,8	4,70	25	7,00	1,00	-	0,10
P2-P4S- 3,25-2	Абатмент угловой анатомический беззольный для формообразования	2,8	4,70	25	7,00	2,00	-	0,11
P2-P4S-	Абатмент угловой	2,8	4,70	25	7,00	3,00	-	0,12

3,25-3	анатомический беззольный для формообразования							
P2-P4S- 3.75,15-1	Абатмент угловой анатомический беззольный для формообразования	3,5	4,10	15	7,00	1,30	-	0,10
P2-P4S- 3.75,15-2	Абатмент угловой анатомический беззольный для формообразования	3,5	4,50	15	7,40	2,25	-	0,12
P2-P4S- 3.75,15-3	Абатмент угловой анатомический беззольный для формообразования	3,5	4,60	15	6,80	3,20	-	0,13
P2-P4S- 3.75,25-1	Абатмент угловой анатомический беззольный для формообразования	3,5	4,90	25	6,70	1,55	-	0,11
P2-P4S- 3.75,25-2	Абатмент угловой анатомический беззольный для формообразования	3,5	4,90	25	6,90	2,55	-	0,12
P2-P4S- 3.75,25-3	Абатмент угловой анатомический беззольный для формообразования	3,5	4,80	25	7,10	3,60	-	0,14
P2WH- 3.75,9	Абатмент беззольный пластиковый	3,5	4,50	-	8,60	-	-	0,14
P2WHC- 4,9	Абатмент беззольный пластиковый с конической платформой	3,35	4,70	-	9,00	-	-	0,15
P3-3,12	Абатмент антиротационный	2,8	3,00	-	11,00	-	-	0,28
P3-3,9	Абатмент антиротационный	2,8	3,00	-	8,00	-	-	0,24
P3-3.75,5	Абатмент антиротационный	3,5	4,50	-	5,00	-	-	0,20
P3-3.75,5- P	Абатмент антиротационный - Perfect Fit	3,5	4,50	-	5,00	-	-	0,20
P3-3.75,7	Абатмент антиротационный	3,5	4,50	-	7,00	-	-	0,24
P3-3.75,7- P	Абатмент антиротационный - Perfect Fit	3,5	4,50	-	7,00	-	-	0,24
P3-3.75,9	Абатмент антиротационный	3,5	4,50	-	9,00	-	-	0,30
P3-3.75,9- P	Абатмент антиротационный - Perfect Fit	3,5	5,50	-	9,00	-	-	0,30
P3-3.75,11	Абатмент антиротационный	3,5	4,70	-	11,10	-	-	0,33
P3-3.75,12	Абатмент антиротационный	3,5	4,70	-	11,90	-	-	0,40
P3- 3.75,12-P	Абатмент антиротационный - Perfect Fit	3,5	4,70	-	11,90	-	-	0,38
P3-3.75,15	Абатмент антиротационный	3,5	4,50	-	14,50	-	-	0,46
P3- 3.75,15-P	Абатмент антиротационный -	3,5	4,50	-	14,50	-	-	0,43

	Perfect Fit							
P3-4.5,12	Абатмент антиротационный	4,5	4,50	-	12,00	-	-	0,40
P3-4.5,12- P	Абатмент антиротационный - Perfect Fit	4,5	4,50	-	12,00	-	-	0,40
P3-4.5,15	Абатмент антиротационный	4,5	4,50	-	15,00	-	-	0,45
P3-4.5,15- P	Абатмент антиротационный - Perfect Fit	4,5	4,50	-	15,00	-	-	0,45
P3-4.5,9	Абатмент антиротационный	4,5	4,50	-	9,00	-	-	0,29
P3-4.5,9-P	Абатмент антиротационный - Perfect Fit	4,5	4,50	-	9,00	-	-	0,30
P3-5,5	Абатмент антиротационный	4,75	5,50	-	5,35	-	-	0,24
P3-5,5-P	Абатмент антиротационный - Perfect Fit	4,75	5,50	-	5,35	-	-	0,23
P3-5,7	Абатмент антиротационный	4,75	5,50	-	7,35	-	-	0,28
P3-5,7-P	Абатмент антиротационный - Perfect Fit	4,75	5,50	-	7,35	-	-	0,28
P3-5,9	Абатмент антиротационный	4,75	5,50	-	9,35	-	-	0,33
P3-5,9-P	Абатмент антиротационный - Perfect Fit	4,7	5,50	-	9,35	-	-	0,31
P3-6,9	Абатмент антиротационный	6	6,50	-	9,00	-	-	0,43
P3-6,9-P	Абатмент антиротационный - Perfect Fit	6	6,50	-	9,00	-	-	0,41
P3a	Винт абатмента короткий	2,2	-	-	9,20	-	-	0,03
P3a-3	Винт для абатмента	2,15	-	-	7,70	-	-	0,06
P3aC	Винт абатмента с конической платформой	-	-	-	-	-	-	0,06
P3al	Винт для абатмента длинный	-	-	-	-	-	-	0,11
P3C-3,12	Абатмент антиротационный с конической платформой	2,8	3,50	-	12,00	-	-	0,29
P3C-3,15	Абатмент антиротационный с конической платформой	2,8	3,50	-	15,00	-	-	0,36
P3C-3,5	Абатмент антиротационный с конической платформой	2,8	3,50	-	5,00	-	-	0,19
P3C-3,7	Абатмент антиротационный с конической платформой	2,8	3,50	-	7,00	-	-	0,21
P3C-3,9	Абатмент антиротационный с конической платформой	2,8	3,50	-	9,00	-	-	0,25
P3C-4,12	Абатмент антиротационный с конической платформой	3,35	4,40	-	12,00	-	-	0,38
P3C-4,15	Абатмент антиротационный с	3,35	4,40	-	15,00	-	-	0,44

	конической платформой							
P3C-4,5	Абатмент антиротационный с конической платформой	3,35	4,40	-	5,00	-	-	0,21
P3C-4,7	Абатмент антиротационный с конической платформой	3,35	4,40	-	7,00	-	-	0,25
P3C-4,9	Абатмент антиротационный с конической платформой	3,35	4,40	-	9,00	-	-	0,31
P3-I6B	Абатмент антиротационный для имплантата I6B	3,2	4,20	-	9,50	-	-	0,20
P3-I6Ba	Винт для абатмента антиротационного для I6B	-	-	-	-	-	-	0,04
P3N- 3.75,5	Абатмент узкий антиротационный	3,5	3,50	-	4,55	-	-	0,13
P3N- 3.75,5-P	Абатмент узкий антиротационный - Perfect Fit	3,5	3,50	-	4,55	-	-	0,13
P3N- 3.75,7	Абатмент узкий антиротационный	3,5	3,50	-	6,55	-	-	0,17
P3N- 3.75,7-P	Абатмент узкий антиротационный - Perfect Fit	3,5	3,50	-	6,55	-	-	0,20
P3N- 3.75,9	Абатмент узкий антиротационный	3,5	3,50	-	8,55	-	-	0,20
P3N- 3.75,9-P	Абатмент узкий антиротационный - Perfect Fit	3,5	3,50	-	8,55	-	-	0,16
P3NC-3,5	Абатмент узкий антиротационный с конической платформой	2,8	3,00	-	5,00	-	-	0,12
P3NC-3,7	Абатмент узкий антиротационный с конической платформой	2,8	3,00	-	7,00	-	-	0,15
P3NC-3,9	Абатмент узкий антиротационный с конической платформой	2,8	3,00	-	9,00	-	-	0,20
P3NC-4,5	Абатмент узкий антиротационный с конической платформой	3,35	3,50	-	5,00	-	-	0,17
P3NC-4,7	Абатмент узкий антиротационный с конической платформой	3,35	3,50	-	7,00	-	-	0,21
P3NC-4,9	Абатмент узкий антиротационный с конической платформой	3,35	3,50	-	9,00	-	-	0,24
P3S-3.75,1	Абатмент анатомический антиротационный	3,5	4,50	-	8,50	1,00	###	0,23
P3S- 3.75,1-P	Абатмент анатомический антиротационный - Perfect Fit	3,5	4,50	-	8,50	1,00	###	0,23
P3S-3.75,2	Абатмент анатомический антиротационный	3,5	4,50	-	9,50	2,00	###	0,27
P3S- 3.75,2-P	Абатмент анатомический антиротационный -	3,5	4,50	-	9,50	2,00	###	0,26

	Perfect Fit							
P3S-3.75,3	Абатмент анатомический антиротационный	3,5	4,50	-	10,50	3,00	###	0,32
P3S- 3.75,3-P	Абатмент анатомический антиротационный - Perfect Fit	3,5	4,50	-	10,50	3,00	###	0,31
P3S-4.5,1	Абатмент анатомический антиротационный	4,5	4,50	-	7,50	1,00	###	0,25
P3S-4.5,1- P	Абатмент анатомический антиротационный - Perfect Fit	4,5	4,50	-	7,50	1,00	###	0,24
P3S-4.5,3	Абатмент анатомический антиротационный	4,5	4,50	-	7,50	3,00	###	0,28
P3S-4.5,3- P	Абатмент анатомический антиротационный - Perfect Fit	4,5	4,50	-	7,50	3,00	###	0,28
P3SC-3,1	Абатмент анатомический антиротационный с конической платформой	2,8	4,50	-	8,00	1,00	###	0,15
P3SC-3,2	Абатмент анатомический антиротационный с конической платформой	2,8	4,50	-	9,00	2,00	###	0,19
P3SC-3,3	Абатмент анатомический антиротационный с конической платформой	2,8	4,50	-	10,00	3,00	###	0,22
P3SC-4,1	Абатмент анатомический антиротационный с конической платформой	3,35	5,00	-	8,60	1,00	###	0,25
P3SC-4,2	Абатмент анатомический антиротационный с конической платформой	3,35	5,00	-	9,60	2,00	###	0,28
P3SC-4,3	Абатмент анатомический антиротационный с конической платформой	3,35	5,00	-	10,60	3,00	###	0,33
P3SC- PEEK-3,1	Абатмент анатомический временный PEEK с конической платформой	2,8	4,50	-	8,00	1,00	###	0,08
P3SC- PEEK-3,2	Абатмент анатомический временный PEEK с конической платформой	2,8	4,50	-	9,00	2,00	###	0,09
P3SC- PEEK-3,3	Абатмент анатомический временный PEEK с конической платформой	2,8	4,50	-	10,00	3,00	###	0,09
P3SC- PEEK-4,1	Абатмент анатомический временный PEEK с конической платформой	3,35	5,00	-	8,60	1,00	###	0,12
P3SC-	Абатмент	3,35	5,00	-	9,60	2,00	###	0,12

PEEK-4,2	анатомический временный PEEK с конической платформой							
P3SC- PEEK-4,3	Абатмент анатомический временный PEEK с конической платформой	3,35	5,00	•	10,60	3,00	###	0,13
P3S- PEEK,1	Абатмент анатомический временный PEEK	3,5	5,00	-	8,50	1,00	###	0,12
P3S- PEEK,2	Абатмент анатомический временный PEEK	3,5	5,00	-	9,50	2,00	###	0,13
P3S- PEEK,3	Абатмент анатомический временный PEEK	3,5	5,00	-	10,50	3,00	###	0,13
P3SW- 3.75,1	Абатмент широкий антиротационный	3,5	5,50	-	8,80	1,00	###	0,41
P3SW- 3.75,2	Абатмент широкий антиротационный	3,5	5,50	-	8,80	2,00	###	43,00
P3SW- 3.75,3	Абатмент широкий антиротационный	3,5	5,50	-	8,80	3,00	###	0,44
P3SWC- 4,1	Абатмент широкий антиротационный с конической платформой	3,35	5,50	•	9,00	1,00	###	0,40
P3SWC- 4,2	Абатмент широкий антиротационный с конической платформой	3,35	5,50	-	9,00	2,00	###	0,43
P3SWC- 4,3	Абатмент широкий антиротационный с конической платформой	3,35	5,50	-	9,00	3,00	###	0,45
P3SZ-3,1	Абатмент циркониевый анатомический	2,8	4,90	-	8,30	1,00	###	0,33
P3SZ-3,2	Абатмент циркониевый анатомический	2,8	4,90	-	9,30	2,00	###	0,36
P3SZ-3,3	Абатмент циркониевый анатомический	2,8	4,90	-	10,30	3,00	###	0,40
P3SZ- 3.75,1	Абатмент циркониевый анатомический	3,5	4,90	-	8,10	1,00	###	0,39
P3SZ- 3.75,2	Абатмент циркониевый анатомический	3,5	4,90	-	9,10	2,00	###	0,43
P3SZ- 3.75,3	Абатмент циркониевый анатомический	3,5	5,20	-	10,10	3,00	###	0,47
P3SZC-3,1	Абатмент циркониевый анатомический с конической платформой	2,8	4,90	•	8,30	1,00	###	0,33
P3SZC-3,2	Абатмент циркониевый анатомический с конической платформой	2,8	4,90	-	9,30	2,00	###	0,37
P3SZC-3,3	Абатмент циркониевый анатомический с конической платформой	2,8	4,90	-	10,30	3,00	###	0,41
P3SZC-4,1	Абатмент циркониевый анатомический с конической платформой	3,35	4,90	-	8,10	1,00	###	0,40
P3SZC-4,2	Абатмент циркониевый анатомический с конической платформой	3,35	4,90	-	9,10	2,00	###	0,44
P3SZC-4,3	Абатмент циркониевый анатомический с	3,35	4,90	-	10,10	3,00	###	0,47

	конической платформой							
P3W-3.75,9	Абатмент широкий антиротационный	3,5	5,50	-	8,60	-	-	0,40
P3W-3.75,9-P	Абатмент широкий антиротационный - Perfect Fit	3,5	5,50	-	8,60	-	-	0,38
P3W-3.75,12	Абатмент широкий антиротационный	3,5	5,50	-	11,55	-	-	0,57
P3W-3.75,12-P	Абатмент широкий антиротационный - Perfect Fit	3,5	5,50	-	11,55	-	-	0,57
P3W-3.75,15	Абатмент широкий антиротационный	3,5	5,50	-	14,50	-	-	0,66
P3W-3.75,15-P	Абатмент широкий антиротационный - Perfect Fit	3,5	5,50	-	14,50	-	-	0,64
P3W-4.5,9	Абатмент широкий антиротационный	4,5	5,50	-	7,50	-	-	0,39
P3W-4.5,9-P	Абатмент широкий антиротационный - Perfect Fit	4,5	5,50	-	7,50	-	-	0,40
P3W-3.9	Абатмент широкий антиротационный	2,8	4,00	-	8,00	-	-	0,32
P3WC-4,12	Абатмент широкий антиротационный с конической платформой	3,35	5,50	-	12,00	-	-	0,59
P3WC-4,15	Абатмент широкий антиротационный с конической платформой	3,35	5,50	-	15,00	-	-	0,66
P3WC-4,9	Абатмент широкий антиротационный с конической платформой	3,35	5,50	-	9,00	-	-	0,41
P4-3,15	Абатмент угловой 15°	2,8	4,60	15	8,30	-	-	0,27
P4-3,25	Абатмент угловой 25°	2,8	4,85	25	8,70	-	-	0,27
P4-3.75,15	Абатмент угловой 15°	3,5	4,85	15	9,00	-	-	0,27
P4-3.75,15-P	Абатмент угловой 15° - Perfect Fit	3,5	4,85	15	9,00	-	-	0,26
P4-3.75,15st	Абатмент угловой 15°	3,5	4,70	15	9,10	-	-	0,36
P4-3.75,25	Абатмент угловой 25°	3,5	4,70	25	8,95	-	-	0,30
P4-3.75,25-P	Абатмент угловой 25° - Perfect Fit	3,5	4,70	25	8,95	-	-	0,29
P4-3.75,35	Абатмент угловой 35°	3,5	4,70	35	10,65	-	-	0,39
P4-3.75,45	Абатмент угловой 45°	3,5	4,70	45	9,85	-	-	0,56
P4-4.5,15	Абатмент угловой 15°	4,5	4,70	15	9,00	-	-	0,28
P4-4.5,15-P	Абатмент угловой 15° - Perfect Fit	4,5	4,70	15	9,00	-	-	0,28
P4-5,15	Абатмент угловой 15°	4,75	6,20	15	10,70	-	-	0,50
P4-5,25	Абатмент угловой 15°	4,75	6,40	25	11,00	-	-	0,51
P4-6,15	Абатмент угловой 15°	6	4,70	15	9,00	-	-	0,57
P4a	Винит для абатмента	2,5	-	-	8,50	-	-	0,04
P4a-3	Винит для абатмента	2,15	-	-	7,70	-	-	0,03
P4C-3,15	Абатмент угловой 15° с конической платформой	2,8	4,60	15	8,30	-	-	0,28
P4C-4,15	Абатмент угловой 15° с конической платформой	3,35	4,85	15	9,00	-	-	0,28
P4C-3,25	Абатмент угловой 25° с	2,8	4,85	25	8,70	-	-	0,28

	конической платформой							
P4C-3,35	Абатмент угловой 35° с конической платформой	2,8	4,70	35	10,60	-	-	0,33
P4C-3,45	Абатмент угловой 45° с конической платформой	2,8	4,70	45	10,00	-	-	0,41
P4C-4,25	Абатмент угловой 25° с конической платформой	3,35	5,00	25	8,40	-	-	0,30
P4C-4,35	Абатмент угловой 35° с конической платформой	3,35	4,70	35	10,60	-	-	0,41
P4C-4,45	Абатмент угловой 45° с конической платформой	3,35	4,70	45	10,00	-	-	0,45
P4L-3,15	Абатмент длинный угловой 15°	2,8	4,70	15	13,30	-	-	0,47
P4L-3,25	Абатмент длинный угловой 15°	2,8	4,70	25	12,90	-	-	0,47
P4L-3.75,15	Абатмент длинный угловой 15°	3,5	4,70	15	13,50	-	-	0,49
P4L-3.75,15-P	Абатмент длинный угловой 15° - Perfect Fit	3,5	4,70	15	13,50	-	-	0,48
P4L-3.75,25	Абатмент длинный угловой 25°	3,5	4,70	25	13,00	-	-	0,51
P4L-3.75,25-P	Абатмент длинный угловой 25° - Perfect Fit	3,5	4,70	25	13,00	-	-	0,50
P4LC-3,15	Абатмент длинный угловой 15° с конической платформой	2,8	4,70	15	13,30	-	-	0,42
P4LC-3,25	Абатмент длинный угловой 25° с конической платформой	2,8	4,70	25	12,90	-	-	0,48
P4LC-4,15	Абатмент длинный угловой 15° с конической платформой	3,35	4,70	15	13,50	-	-	0,50
P4LC-4,25	Абатмент длинный угловой 25° с конической платформой	3,35	4,70	25	13,00	-	-	0,51
P4N-3.75,15	Абатмент узкий угловой 15°	3,5	4,10	15	9,10	-	-	0,23
P4NC-3,15	Абатмент узкий угловой 15° с конической платформой	2,8	4,10	15	8,60	-	-	0,22
P4NC-4,15	Абатмент узкий угловой 15° с конической платформой	3,35	4,10	15	8,60	-	-	0,24
P4S-3.75,15-1	Абатмент угловой анатомический 15°	3,5	4,10	15	7,10	1,30	###	0,20
P4S-3.75,15-1-P	Абатмент угловой анатомический 15° - Perfect Fit	3,5	4,10	15	7,10	1,30	###	0,19
P4S-3.75,15-2	Абатмент угловой анатомический 15°	3,5	4,50	15	7,30	2,25	###	0,21
P4S-3.75,15-2-P	Абатмент угловой анатомический 15° - Perfect Fit	3,5	4,50	15	7,30	2,25	###	0,21
P4S-3.75,15-3	Абатмент угловой анатомический 15°	3,5	4,60	15	6,90	3,20	###	0,23
P4S-3.75,15-3-P	Абатмент угловой анатомический 15° - Perfect Fit	3,5	4,60	15	6,90	3,20	###	0,23

P4S-3.75,25-1	Абатмент угловой анатомический 25°	3,5	4,90	25	6,90	1,55	###	0,21
P4S-3.75,25-2	Абатмент угловой анатомический 25°	3,5	4,90	25	7,00	2,55	###	0,22
P4S-3.75,25-3	Абатмент угловой анатомический 25°	3,5	4,80	25	7,20	3,60	###	0,24
P4SC-3,15-1	Абатмент угловой анатомический 15° с конической плаформой	2,8	4,10	15	7,80	1,30	###	0,18
P4SC-3,15-2	Абатмент угловой анатомический 15° с конической плаформой	2,8	4,50	15	7,90	2,25	###	0,19
P4SC-3,15-3	Абатмент угловой анатомический 15° с конической плаформой	2,8	4,60	15	7,30	3,20	###	0,21
P4SC-3,25-1	Абатмент угловой анатомический 25° с конической плаформой	2,8	4,90	25	7,85	1,55	###	0,20
P4SC-3,25-2	Абатмент угловой анатомический 25° с конической плаформой	2,8	4,90	25	7,90	2,55	###	0,22
P4SC-3,25-3	Абатмент угловой анатомический 25° с конической плаформой	2,8	4,80	25	8,20	3,60	###	0,23
P4SC-4,15-1	Абатмент угловой анатомический 15° с конической плаформой	3,35	4,10	15	7,80	1,30	###	0,21
P4SC-4,15-2	Абатмент угловой анатомический 15° с конической плаформой	3,35	4,50	15	7,90	2,25	###	0,23
P4SC-4,15-3	Абатмент угловой анатомический 15° с конической плаформой	3,35	4,60	15	7,30	3,20	###	0,24
P4SC-4,25-1	Абатмент угловой анатомический 25° с конической плаформой	3,35	4,90	25	7,85	1,55	###	0,22
P4SC-4,25-2	Абатмент угловой анатомический 25° с конической плаформой	3,35	4,90	25	7,90	2,55	###	0,23
P4SC-4,25-3	Абатмент угловой анатомический 25° с конической плаформой	3,35	4,80	25	8,20	3,60	###	0,25
P4SC-Peek-3,15-1	Абатмент угловой временный анатомический PEEK с конической платформой	2,8	4,10	15	7,80	1,30	###	0,10
P4SC-Peek-3,15-2	Абатмент угловой временный анатомический PEEK с конической платформой	2,8	4,50	15	7,90	2,25	###	0,10
P4SC-Peek-3,15-3	Абатмент угловой временный анатомический PEEK с конической платформой	2,8	4,60	15	7,30	3,20	###	0,12
P4SC-Peek-3,25-1	Абатмент угловой временный анатомический PEEK с конической платформой	2,8	4,90	25	7,85	1,55	###	0,10
P4SC-Peek-3,25-2	Абатмент угловой временный анатомический PEEK с конической платформой	2,8	4,90	25	7,90	2,55	###	0,11

P4SC- Peek-3,25- 3	Абатмент угловой временный анатомический PEEK с конической платформой	2,8	4,80	25	8,20	3,60	###	0,20
P4SC- Peek-4,15- 1	Абатмент угловой временный анатомический PEEK с конической платформой	3,35	4,10	15	7,80	1,30	###	0,13
P4SC- Peek-4,15- 2	Абатмент угловой временный анатомический PEEK с конической платформой	3,35	4,50	15	7,90	2,25	###	0,14
P4SC- Peek-4,15- 3	Абатмент угловой временный анатомический PEEK с конической платформой	3,35	4,60	15	7,30	3,20	###	0,14
P4SC- Peek-4,25- 1	Абатмент угловой временный анатомический PEEK с конической платформой	3,35	4,90	25	7,85	1,55	###	0,13
P4SC- Peek-4,25- 2	Абатмент угловой временный анатомический PEEK с конической платформой	3,35	4,90	25	7,90	2,55	###	0,13
P4SC- Peek-4,25- 3	Абатмент угловой временный анатомический PEEK с конической платформой	3,35	4,80	25	8,20	3,60	###	0,14
P4S-I6B	Абатмент угловой анатомический для I6B	3,2	4,65	15	8,00	1,80	###	0,17
P4S- Peek,15-1	Абатмент угловой временный анатомический PEEK	3,5	4,10	15	7,10	1,30	###	0,06
P4S- Peek,15-2	Абатмент угловой временный анатомический PEEK	3,5	4,50	15	7,30	2,25	###	0,08
P4S- Peek,15-3	Абатмент угловой временный анатомический PEEK	3,5	4,60	15	6,90	3,20	###	0,09
P4S- Peek,25-1	Абатмент угловой временный анатомический PEEK	3,5	4,90	25	6,90	1,55	###	0,10
P4S- Peek,25-2	Абатмент угловой временный анатомический PEEK	3,5	4,90	25	7,00	2,55	###	0,10
P4S- Peek,25-3	Абатмент угловой временный анатомический PEEK	3,5	4,80	25	7,20	3,60	###	0,11
P4SWC- 4,1	Абатмент угловой анатомический 15° широкий с конической платформой	3,35	4,85	15	8,10	1,00	###	0,58
P4SWC- 4,2	Абатмент угловой анатомический 15° широкий с конической платформой	3,35	4,85	15	8,10	2,00	###	0,58
P4SWC- 4,3	Абатмент угловой анатомический 15° широкий с конической платформой	3,35	4,85	15	8,10	3,00	###	0,60
P4SZ- 3,15-1	Абатмент анатомический угловой циркониевый	2,8	5,10	15	7,00	1,00	###	0,24

P4SZ-3,15-2	Абатмент анатомический угловой циркониевый	2,8	5,10	15	7,00	2,00	###	0,31
P4SZ-3,15-3	Абатмент анатомический угловой циркониевый	2,8	5,20	15	7,00	3,00	###	0,36
P4SZ-3.75,15-1	Абатмент анатомический угловой циркониевый	3,5	5,10	15	7,00	1,00	###	0,24
P4SZ-3.75,15-2	Абатмент анатомический угловой циркониевый	3,5	5,10	15	7,00	2,00	###	0,32
P4SZ-3.75,15-3	Абатмент анатомический угловой циркониевый	3,5	5,20	15	7,00	3,00	###	0,37
P4SZ-3.75,25-1	Абатмент анатомический угловой циркониевый	3,5	5,00	25	7,20	1,00	###	0,24
P4SZ-3.75,25-2	Абатмент анатомический угловой циркониевый	3,5	5,00	25	7,20	2,00	###	0,33
P4SZ-3.75,25-3	Абатмент анатомический угловой циркониевый	3,5	5,00	25	7,20	3,00	###	0,39
P4SZC-3,15-1	Абатмент анатомический угловой циркониевый с конической платформой	2,8	5,10	15	7,00	1,00	###	0,25
P4SZC-3,15-2	Абатмент анатомический угловой циркониевый с конической платформой	2,8	5,10	15	7,00	2,00	###	0,31
P4SZC-3,15-3	Абатмент анатомический угловой циркониевый с конической платформой	2,8	5,20	15	7,00	3,00	###	0,37
P4SZC-3,25-1	Абатмент анатомический угловой циркониевый с конической платформой	2,8	5,00	25	7,20	1,00	###	0,25
P4SZC-3,25-2	Абатмент анатомический угловой циркониевый с конической платформой	2,8	5,00	25	7,20	2,00	###	0,26
P4SZC-3,25-3	Абатмент анатомический угловой циркониевый с конической платформой	2,8	5,00	25	7,20	3,00	###	0,28
P4SZC-4,15-1	Абатмент анатомический угловой циркониевый с конической платформой	3,35	5,10	15	7,00	1,00	###	0,25
P4SZC-4,15-2	Абатмент анатомический угловой циркониевый с конической платформой	3,35	5,10	15	7,00	2,00	###	0,30
P4SZC-4,15-3	Абатмент анатомический угловой циркониевый с конической платформой	3,35	5,20	15	7,00	3,00	###	0,34
P4SZC-4,25-1	Абатмент анатомический угловой циркониевый с	3,35	5,00	25	7,20	1,00	###	0,26

	конической платформой							
P4SZC-4,25-2	Абатмент анатомический угловой циркониевый с конической платформой	3,35	5,00	25	7,20	2,00	###	0,32
P4SZC-4,25-3	Абатмент анатомический угловой циркониевый с конической платформой	3,35	5,00	25	7,20	3,00	###	0,35
P6H-3.75,0.5	Абатмент эстетический с шестигранником	3,5	4,70	-	0,80	-	-	0,08
P6H-3.75,1.5	Абатмент эстетический с шестигранником	3,5	4,70	-	1,50	-	-	0,15
P6H-3.75,3	Абатмент эстетический с шестигранником	3,5	4,70	-	3,00	-	-	0,20
P6H-3.75,4	Абатмент эстетический с шестигранником	3,5	4,70	-	4,00	-	-	0,26
P6H-3.75,6	Абатмент эстетический с шестигранником	3,5	4,70	-	6,00	-	-	0,41
P6H-4.5,1	Абатмент эстетический с шестигранником	4,5	4,70	-	1,00	-	-	0,11
P6H-4.5,2	Абатмент эстетический с шестигранником	4,5	4,70	-	2,00	-	-	0,17
P6H-4.5,3	Абатмент эстетический с шестигранником	4,5	4,70	-	3,00	-	-	0,21
P6HC-3,0.5	Абатмент эстетический с конической платформой	2,8	4,70	-	0,50	-	-	0,08
P6HC-3,1.5	Абатмент эстетический с конической платформой	2,8	4,70	-	1,50	-	-	0,14
P6HC-3,3	Абатмент эстетический с конической платформой	2,8	4,70	-	3,00	-	-	0,20
P6HC-3,4	Абатмент эстетический с конической платформой	2,8	4,70	-	4,00	-	-	0,25
P6HC-3,6	Абатмент эстетический с конической платформой	2,8	4,70	-	6,00	-	-	0,40
P6HC-4,0.5	Абатмент эстетический с конической платформой	3,35	4,70	-	0,50	-	-	0,11
P6HC-4,1.5	Абатмент эстетический с конической платформой	3,35	4,70	-	1,50	-	-	0,16
P6HC-4,3	Абатмент эстетический с конической платформой	3,35	4,70	-	3,00	-	-	0,22
P6HC-4,4	Абатмент эстетический с конической платформой	3,35	4,70	-	4,00	-	-	0,27
P6HC-4,6	Абатмент эстетический с конической платформой	3,35	4,70	-	6,00	-	-	0,42
P7-3.75,1	Абатмент эстетический антиротационный	3,5	4,70	-	0,90	-	-	0,19
P7-3.75,2	Абатмент эстетический антиротационный	3,5	4,70	-	1,90	-	-	0,25
P7-3.75,3	Абатмент эстетический антиротационный	3,5	4,70	-	2,90	-	-	0,31


P7C-3,1	Абатмент эстетический антиротационный с конической платформой	2,8	4,70	-	1,00	-	-	0,17
P7C-3,2	Абатмент эстетический антиротационный с конической платформой	2,8	4,70	-	2,00	-	-	0,24
P7C-3,3	Абатмент эстетический антиротационный с конической платформой	2,8	4,70	-	3,00	-	-	0,30
P7C-4,1	Абатмент эстетический антиротационный с конической платформой	3,35	4,70	-	1,00	-	-	0,19
P7C-4,2	Абатмент эстетический антиротационный с конической платформой	3,35	4,70	-	2,00	-	-	0,26
P7C-4,3	Абатмент эстетический антиротационный с конической платформой	3,35	4,70	-	3,00	-	-	0,32
P9-3.75,11	Абатмент пластиковый литой	3,5	4,50	-	11,50	-	-	18,00
P9-3.75,11-P	Абатмент пластиковый литой - Perfect Fit	3,5	4,50	-	11,50	-	-	17,00
P9-4.5,11	Абатмент пластиковый литой	4,5	4,50	-	11,50	-	-	19,00
P9-4.5,11-P	Абатмент пластиковый литой - Perfect Fit	4,5	4,50	-	11,50	-	-	18,00
P9C-3	Абатмент пластиковый литой с шестигранником и конической платформой	2,8	4,50	-	11,75	-	-	0,17
P9C-4	Абатмент пластиковый литой с шестигранником и конической платформой	3,35	4,50	-	11,75	-	-	0,19
P9G-3.75,11	Абатмент пластиковый литой без шестигранника с золотым основанием	3,5	4,50	-	11,50	-	-	0,18
P9G-4.5,11	Абатмент пластиковый литой без шестигранника с золотым основанием	4,5	4,50	-	11,50	-	-	0,19
P9GC-3	Абатмент пластиковый литой без шестигранника, с золотым основанием и конической платформой	2,8	4,50	-	11,75	-	-	0,17
P9GC-4	Абатмент пластиковый литой без шестигранника, с золотым основанием и конической платформой	3,35	4,50	-	11,75	-	-	0,19
P9H-3.75,11	Абатмент пластиковый литой с шестигранником	3,5	4,50	-	11,50	-	-	0,18
P9HG-3.75,11	Абатмент пластиковый литой с шестигранником и	3,5	4,50	-	11,50	-	-	0,18

	золотым основанием							
P9HG-4.5,11	Абатмент пластиковый литой с шестигранником и золотым основанием	4,5	4,50	-	11,00	-	-	0,19
P9HGC-3,11	Абатмент пластиковый литой с шестигранником и золотым основанием с конической платформой	2,8	4,50	-	11,75	-	-	0,17
P9HGC-4,11	Абатмент пластиковый литой с шестигранником и золотым основанием с конической платформой	3,35	4,50	-	11,75	-	-	0,20
P9HR-3.75,11	Абатмент пластиковый литой с шестигранником, хром-кобальтовым основанием	3,5	4,50	-	12,50	-	-	0,18
P9HRC-3,11	Абатмент пластиковый литой с шестигранником, хром-кобальтовым основанием с конической платформой	2,8	4,50	-	12,50	-	-	0,17
P9HRC-4,11	Абатмент пластиковый литой с шестигранником, хром-кобальтовым основанием с конической платформой	3,35	4,50	-	11,00	-	-	0,20
P12-3.75	Абатмент с плоским соединением	3,5	4,50	-	4,35	-	-	0,21
P12-3.75-T	Временный абатмент с плоским соединением	3,5	4,50	-	14,65	-	-	0,28
P12-3.75-T/L	Временный абатмент с плоским соединением	3,5	4,50	-	11,60	-	-	0,30
P15-3,1	Абатмент временный	2,8	4,70	-	1,00	-	-	0,27
P15-3,2	Абатмент временный	2,8	4,70	-	2,00	-	-	0,30
P15-3,3	Абатмент временный	2,8	4,70	-	3,00	-	-	0,36
P15-3,4	Абатмент временный	2,8	4,70	-	4,00	-	-	0,40
P15-3,5	Абатмент временный	2,8	4,70	-	5,00	-	-	0,45
P15-3,6	Абатмент временный	2,8	4,70	-	6,00	-	-	0,52
P15-3,7	Абатмент временный	2,8	4,70	-	7,00	-	-	0,58
P15-3.75,1	Абатмент временный	3,5	4,70	-	1,00	-	-	0,28
P15-3.75,2	Абатмент временный	3,5	4,70	-	2,00	-	-	0,33
P15-3.75,3	Абатмент временный	3,5	4,70	-	3,00	-	-	0,38
P15-3.75,4	Абатмент временный	3,5	4,70	-	4,00	-	-	0,42
P15-3.75,5	Абатмент временный	3,5	4,70	-	5,00	-	-	0,47
P15-3.75,6	Абатмент временный	3,5	4,70	-	6,00	-	-	0,53
P15-3.75,7	Абатмент временный	3,5	4,70	-	7,00	-	-	0,60
P15C-3,1	Абатмент временный с конической платформой	2,8	4,70	-	1,00	-	-	0,27

P15C-3,2	Абатмент временный с конической платформой	2,8	4,70	-	2,00	-	-	0,32
P15C-3,3	Абатмент временный с конической платформой	2,8	4,70	-	3,00	-	-	0,38
P15C-3,4	Абатмент временный с конической платформой	2,8	4,70	-	4,00	-	-	0,43
P15C-3,5	Абатмент временный с конической платформой	2,8	4,70	-	5,00	-	-	0,48
P15C-3,6	Абатмент временный с конической платформой	2,8	4,70	-	6,00	-	-	0,54
P15C-3,7	Абатмент временный с конической платформой	2,8	4,70	-	7,00	-	-	0,61
P15C-4,1	Абатмент временный с конической платформой	3,35	4,70	-	1,00	-	-	0,29
P15C-4,2	Абатмент временный с конической платформой	3,35	4,70	-	2,00	-	-	0,34
P15C-4,3	Абатмент временный с конической платформой	3,35	4,70	-	3,00	-	-	0,38
P15C-4,4	Абатмент временный с конической платформой	3,35	4,70	-	4,00	-	-	0,43
P15C-4,5	Абатмент временный с конической платформой	3,35	4,70	-	5,00	-	-	0,49
P15C-4,6	Абатмент временный с конической платформой	3,35	4,70	-	6,00	-	-	0,54
P15C-4,7	Абатмент временный с конической платформой	3,35	4,70	-	7,00	-	-	0,61
РК-РЗ-3.75,1	Анатомический антиротационный абатмент	3,5	5,17	-	1,00	-	-	0,25
РК-РЗ-3.75,2	Анатомический антиротационный абатмент	3,5	5,17	-	2,00	-	-	0,35
РК-РЗ-3.75,3	Анатомический антиротационный абатмент	3,5	5,17	-	3,00	-	-	0,47
РК-РЗ-3.75,4	Анатомический антиротационный абатмент	3,5	5,17	-	4,00	-	-	0,58

10.3 Аттачменты:


10.3.1 Аттачмент шаровидный Р5

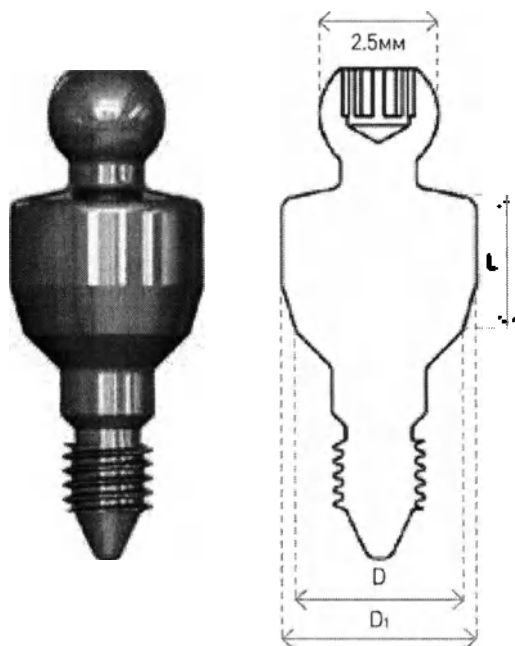

Шаровидный аттачмент служит для фиксации съёмного протеза на имплантате. Аттачмент снабжён колпачком из нержавеющей стали и силиконовым колпачком. Выпускаются силиконовые колпачки трёх степеней жёсткости (1-3) от наиболее жёсткого до наиболее мягкого.

Аттачмент P5 поставляется в комплекте с металлическим и силиконовым колпачками.

10.3.2 Аттачмент угловой шаровидный 20° P2-20

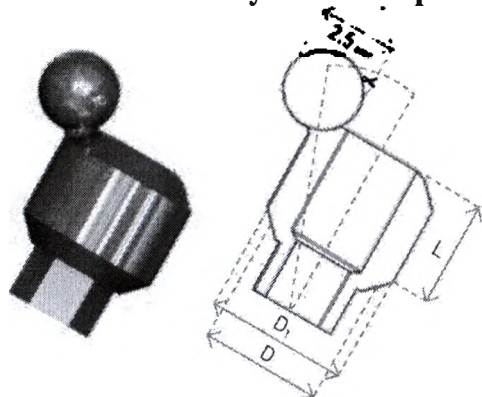

Многофункциональный угловой шаровидный аттачмент разработан, для фиксации съёмного протеза на имплантатах, установленных под углом. Он может использоваться даже при значительном наклоне имплантата. Угловой шаровидный аттачмент снабжён колпачком из нержавеющей стали и промежуточным силиконовым колпачком. Выпускаются силиконовые колпачки трёх степеней жёсткости, 1- 3, от наиболее жёсткого до наиболее мягкого. Этот уникальный абатмент представляет собой решение проблем, которые возникают при непараллельной установке имплантатов.

Преимущества:

Отличная фиксация съёмного протеза на имплантатах.

Возможность отрегулировать угол, под которым расположен имплантат.

Новый дизайн избавляет от трудностей, возникающих при фиксации и снятии верхних протезов, боковом давлении со стороны других зубов/имплантатов и износе шаровидного аттачмента.

Аттачменты модели P5-20 поставляются с винтом P5-20a (выпускаются аттачменты высотой 1, 2, 3, 4, 5, 6 мм). Аттачмент P5-20 поставляется в комплекте с металлическим и силиконовым колпачками.

Также для удобства пользователя аттачменты выпускаются в наборах. Состав наборов:
Наборы аттачментов шаровидных - a+ b+c (Ball Attachment Abutment - a+b+c):

1. P5-3,1set:

- Колпачок металлический (Metal Cap), P5a;
- Колпачок силиконовый - стандартный (Silicon Cap – medium), P5b-2;
- Аттачмент шаровидный (Ball Attachment Abutment), P5-3,1;

2. P5-3,2set:

- Колпачок металлический (Metal Cap), P5a;
- Колпачок силиконовый - стандартный (Silicon Cap – medium), P5b-2;
- Аттачмент шаровидный (Ball Attachment Abutment), P5-3,2;

3. P5-3,3set:

- Колпачок металлический (Metal Cap), P5a;
- Колпачок силиконовый - стандартный (Silicon Cap – medium), P5b-2;
- Аттачмент шаровидный (Ball Attachment Abutment), P5-3,3;

4. P5-3,4set:

- Колпачок металлический (Metal Cap), P5a;
- Колпачок силиконовый - стандартный (Silicon Cap – medium), P5b-2;
- Аттачмент шаровидный (Ball Attachment Abutment), P5-3,4;

5. P5-3,5set:

- Колпачок металлический (Metal Cap), P5a;
- Колпачок силиконовый - стандартный (Silicon Cap – medium), P5b-2;
- Аттачмент шаровидный (Ball Attachment Abutment), P5-3,5;

6. P5-3,6set:

- Колпачок металлический (Metal Cap), P5a;
- Колпачок силиконовый - стандартный (Silicon Cap – medium), P5b-2;
- Аттачмент шаровидный (Ball Attachment Abutment), P5-3,6;

7. P5-3.75,1set:

- Колпачок металлический (Metal Cap), P5a;
- Колпачок силиконовый - стандартный (Silicon Cap – medium), P5b-2;
- Аттачмент шаровидный (Ball Attachment Abutment), P5-3.75,1;

8. P5-3.75,2set:

- Колпачок металлический (Metal Cap), P5a;
- Колпачок силиконовый - стандартный (Silicon Cap – medium), P5b-2;
- Аттачмент шаровидный (Ball Attachment Abutment), P5-3.75,2;

9. P5-3.75,3set:

- Колпачок металлический (Metal Cap), P5a;
- Колпачок силиконовый - стандартный (Silicon Cap – medium), P5b-2;
- Аттачмент шаровидный (Ball Attachment Abutment), P5-3.75,3;

10. P5-3.75,4set:

- Колпачок металлический (Metal Cap), P5a;

- Колпачок силиконовый - стандартный (Silicon Cap – medium), P5b-2;
- Аттачмент шаровидный (Ball Attachment Abutment), P5-3.75,4;

11. P5-3.75,5set:

- Колпачок металлический (Metal Cap), P5a;
- Колпачок силиконовый - стандартный (Silicon Cap – medium), P5b-2;
- Аттачмент шаровидный (Ball Attachment Abutment), P5-3.75,5;

12. P5-3.75,6set:

- Колпачок металлический (Metal Cap), P5a;
- Колпачок силиконовый - стандартный (Silicon Cap – medium), P5b-2;
- Аттачмент шаровидный (Ball Attachment Abutment), P5-3.75,6.

Наборы аттачментов шаровидных - a+ b+c с конической платформой (Ball Attachment Abutment - a+ b+c with conical platform):

1. P5C-3,1set ; P5C-4,1set:

- Колпачок металлический (Metal Cap), P5a;
- Колпачок силиконовый - стандартный (Silicon Cap – medium), P5b-2;
- Аттачмент шаровидный с конической платформой (Ball Attachment Abutment with conical platform), P5C-3,1; P5C-4,1;

2. P5C-3,2set; P5C-4,2set:

- Колпачок металлический (Metal Cap), P5a;
- Колпачок силиконовый - стандартный (Silicon Cap – medium), P5b-2;
- Аттачмент шаровидный с конической платформой (Ball Attachment Abutment with conical platform), P5C-3,2; P5C-4,2;

3. P5C-3,3set; P5C-4,3set:

- Колпачок металлический (Metal Cap), P5a;
- Колпачок силиконовый - стандартный (Silicon Cap – medium), P5b-2;
- Аттачмент шаровидный с конической платформой (Ball Attachment Abutment with conical platform), P5C-3,3; P5C-4,3;

4. P5C-3,4set; P5C-4,4set:

- Колпачок металлический (Metal Cap), P5a;
- Колпачок силиконовый - стандартный (Silicon Cap – medium), P5b-2;
- Аттачмент шаровидный с конической платформой (Ball Attachment Abutment with conical platform), P5C-3,4; P5C-4,4;

5. P5C-3,5set; P5C-4,5 set:

- Колпачок металлический (Metal Cap), P5a;
- Колпачок силиконовый - стандартный (Silicon Cap – medium), P5b-2;
- Аттачмент шаровидный с конической платформой (Ball Attachment Abutment with conical platform), P5C-3,5; P5C-4,5;

6. P5C-3,6set; P5C-4,6set:

- Колпачок металлический (Metal Cap), P5a;
- Колпачок силиконовый - стандартный (Silicon Cap – medium), P5b-2;
- Аттачмент шаровидный с конической платформой (Ball Attachment Abutment with conical platform), P5C-3,6; P5C-4,6.

Наборы аттачментов шаровидных для имплантата I6B - a+b+c (Ball Attachment for I6B Implant - a+b+c):

1. P5-I6B,1set:

- Колпачок металлический (Metal Cap), P5a;
- Колпачок силиконовый - стандартный (Silicon Cap – medium), P5b-2;
- Аттачмент шаровидный (Ball Attachment Abutment), P5-I6B,1;

2. P5-I6B,2set:

- Колпачок металлический (Metal Cap), P5a;
- Колпачок силиконовый - стандартный (Silicon Cap – medium), P5b-2;
- Аттачмент шаровидный (Ball Attachment Abutment), P5-I6B,2;

3. P5-I6B,3set:

- Колпачок металлический (Metal Cap), P5a;
- Колпачок силиконовый - стандартный (Silicon Cap – medium), P5b-2;
- Аттачмент шаровидный (Ball Attachment Abutment), P5-I6B,3.

Наборы аттачментов угловых шаровидных 20° - a+ b+c (Angular Ball Attachment 20° - a+ b+c):

1. Набор аттачмента углового шаровидного 20° высотой 1мм - a+ b+c (Angular Ball Attachment 20° - 1 mm - a+ b+c), P5-3.75,20-1set:

- Колпачок металлический (Metal Cap), P5a;
- Колпачок силиконовый - стандартный (Silicon Cap – medium), P5b-2;
- Аттачмент шаровидный (Ball Attachment Abutment), P5-3.75,20-1;

2. Набор аттачмента углового шаровидного 20° высотой 2мм -a+ b+c (Angular Ball Attachment 20° - 2 mm - a+ b+c), P5-3.75,20-2set:

- Колпачок металлический (Metal Cap), P5a;
- Колпачок силиконовый - стандартный (Silicon Cap – medium), P5b-2;
- Аттачмент шаровидный (Ball Attachment Abutment), P5-3.75,20-2;

3. Набор аттачмента углового шаровидного 20° высотой 3мм -a+ b+c (Angular Ball Attachment 20° - 3 mm - a+ b+c), P5-3.75,20-3set:

- Колпачок металлический (Metal Cap), P5a;
- Колпачок силиконовый - стандартный (Silicon Cap – medium), P5b-2;
- Аттачмент шаровидный (Ball Attachment Abutment), P5-3.75,20-3;

4. Набор аттачмента углового шаровидного 20° высотой 4мм - a+ b+c (Angular Ball Attachment 20° - 4 mm - a+ b+c), P5-3.75,20-4set:

- Колпачок металлический (Metal Cap), P5a;
- Колпачок силиконовый - стандартный (Silicon Cap – medium), P5b-2;
- Аттачмент шаровидный (Ball Attachment Abutment), P5-3.75,20-4;

5. Набор аттачмента углового шаровидного 20° высотой 5мм - a+ b+c (Angular Ball Attachment 20° - 5 mm - a+ b+c), P5-3.75,20-5set:

- Колпачок металлический (Metal Cap), P5a;
- Колпачок силиконовый - стандартный (Silicon Cap – medium), P5b-2;
- Аттачмент шаровидный (Ball Attachment Abutment), P5-3.75,20-5;

6. Набор аттачмента углового шаровидного 20° высотой 6мм - a+ b+c (Angular Ball Attachment 20° - 6 mm- a+ b+c), P5-3.75,20-6set:

- Колпачок металлический (Metal Cap), P5a;
- Колпачок силиконовый - стандартный (Silicon Cap – medium), P5b-2;
- Аттачмент шаровидный (Ball Attachment Abutment), P5-3.75,20-6;

7. Набор аттачмента углового шаровидного 20° высотой 1мм - a+ b+c (Angular Ball Attachment 20° - 1 mm - a+ b+c), P5-3,20-1set:

- Колпачок металлический (Metal Cap), P5a;
- Колпачок силиконовый - стандартный (Silicon Cap – medium), P5b-2;
- Аттачмент шаровидный (Ball Attachment Abutment), P5-3,20-1

8. Набор аттачмента углового шаровидного 20° высотой 2мм -a+ b+c (Angular Ball Attachment 20° - 2 mm - a+ b+c), P5-3,20-2set:

- Колпачок металлический (Metal Cap), P5a;
- Колпачок силиконовый - стандартный (Silicon Cap – medium), P5b-2;
- Аттачмент шаровидный (Ball Attachment Abutment), P5-3,20-2;

9. Набор аттачмента углового шаровидного 20° высотой 3мм -a+ b+c (Angular Ball Attachment 20° - 3 mm - a+ b+c), P5-3,20-3set:

- Колпачок металлический (Metal Cap), P5a;
- Колпачок силиконовый - стандартный (Silicon Cap – medium), P5b-2;
- Аттачмент шаровидный (Ball Attachment Abutment), P5-3,20-3;

10. Набор аттачмента углового шаровидного 20° высотой 4мм - a+ b+c (Angular Ball Attachment 20° - 4 mm - a+ b+c), P5-3,20-4set:

- Колпачок металлический (Metal Cap), P5a;
- Колпачок силиконовый - стандартный (Silicon Cap – medium), P5b-2;
- Аттачмент шаровидный (Ball Attachment Abutment), P5-3,20-4;

11. Набор аттачмента углового шаровидного 20° высотой 5мм - a+ b+c (Angular Ball Attachment 20° - 5 mm - a+ b+c), P5-3,20-5set:

- Колпачок металлический (Metal Cap), P5a;
- Колпачок силиконовый - стандартный (Silicon Cap – medium), P5b-2;
- Аттачмент шаровидный (Ball Attachment Abutment), P5-3,20-5;

12. Набор аттачмента углового шаровидного 20° высотой 6мм - a+ b+c (Angular Ball Attachment 20° - 6 mm- a+ b+c), P5-3,20-6set:

- Колпачок металлический (Metal Cap), P5a;
- Колпачок силиконовый - стандартный (Silicon Cap – medium), P5b-2;
- Аттачмент шаровидный (Ball Attachment Abutment), P5-3,20-6.

Набор аттачментов угловых шаровидных 20° с конической платформой – a + b+c (Angular Ball Attachment 20° with conical platform - a+b+c):

1. Набор аттачмента углового шаровидного 20° высотой 1мм с конической платформой – a+b+c (Angular Ball Attachment 20° - 1 mm with conical platform - a+ b+c), P5C-3,20-1set; P5C-4,20-1set:

- Колпачок металлический (Metal Cap), P5a;
- Колпачок силиконовый - стандартный (Silicon Cap – medium), P5b-2;
- Аттачмент шаровидный с конической платформой (Ball Attachment Abutment with conical platform), P5C-3,20-1; P5C-4,20-1;

2. Набор аттачмента углового шаровидного 20° высотой 2мм с конической платформой – a+b+c (Angular Ball Attachment 20° - 2 mm with conical platform - a+ b+c), P5C-3,20-2set; P5C-4,20-2set:

- Колпачок металлический (Metal Cap), P5a;
- Колпачок силиконовый - стандартный (Silicon Cap – medium), P5b-2;
- Аттачмент шаровидный с конической платформой (Ball Attachment Abutment with conical platform), P5C-3,20-2; P5C-4,20-2;

3. Набор аттачмента углового шаровидного 20° высотой 3мм с конической платформой – a+b+c (Angular Ball Attachment 20° - 3 mm with conical platform - a+ b+c), P5C-3,20-3set; P5C-4,20-3set:

- Колпачок металлический (Metal Cap), P5a;
- Колпачок силиконовый - стандартный (Silicon Cap – medium), P5b-2;
- Аттачмент шаровидный с конической платформой (Ball Attachment Abutment with conical platform), P5C-3,20-3; P5C-4,20-3;

4. Набор аттачмента углового шаровидного 20° высотой 4мм с конической платформой – a+b+c (Angular Ball Attachment 20° - 4 mm with conical platform - a+b+c), P5C-3,20-4set; P5C-4,20-4set:

- Колпачок металлический (Metal Cap), P5a;
- Колпачок силиконовый - стандартный (Silicon Cap – medium), P5b-2;
- Аттачмент шаровидный с конической платформой (Ball Attachment Abutment with conical platform), P5C-3,20-4; P5C-4,20-4;

5. Набор аттачмента углового шаровидного 20° высотой 5мм с конической платформой – a+b+c (Angular Ball Attachment 20° - 5 mm with conical platform - a+b+c), P5C -3,20-5set; P5C -4,20-5set:

- Колпачок металлический (Metal Cap), P5a;
- Колпачок силиконовый - стандартный (Silicon Cap – medium), P5b-2;
- Аттачмент шаровидный с конической платформой (Ball Attachment Abutment with conical platform), P5C-3,20-5; P5C-4,20-5;

6. Набор аттачмента углового шаровидного 20° высотой 6мм с конической платформой - a+ b+c (Angular Ball Attachment 20° - 6 mm with conical platform - a+ b+c), P5C -3,20-6set; P5C -4,20-6set:

- Колпачок металлический (Metal Cap), P5a;
- Колпачок силиконовый - стандартный (Silicon Cap – medium), P5b-2;
- Аттачмент шаровидный с конической платформой (Ball Attachment Abutment with conical platform), P5C-3,20-6; P5C-4,20-6.

Наборы аттачментов шаровидных - a+b+c (Ball Attachment - a+b+c):

1. P5-4.5,1set:

- Колпачок металлический (Metal Cap), P5a;
- Колпачок силиконовый - стандартный (Silicon Cap – medium), P5b-2;
- Аттачмент шаровидный (Ball Attachment Abutment), P5-4.5,1;

2. P5-4.5,2set:

- Колпачок металлический (Metal Cap), P5a;
- Колпачок силиконовый - стандартный (Silicon Cap – medium), P5b-2;
- Аттачмент шаровидный (Ball Attachment Abutment), P5-4.5,2;

3. P5-4.5,4set:

- Колпачок металлический (Metal Cap), P5a;
- Колпачок силиконовый - стандартный (Silicon Cap – medium), P5b-2;
- Аттачмент шаровидный (Ball Attachment Abutment), P5-4.5,4.

Номер по каталогу	Описание	Диаметр, D (мм)	Диаметр, D1 (мм)	Угол, α (°)	Длина L (мм)	Длина LS (мм)	Длина LS1 (мм)	Вес (г)
P5-3,1	Аттачмент шаровидный	2,8	2,95	-	1,00	-	-	0,09
P5-3,1.5	Аттачмент шаровидный	2,8	2,95	-	1,50	-	-	0,11
P5-3,2	Аттачмент шаровидный	2,8	2,95	-	2,00	-	-	0,13
P5-3,3	Аттачмент шаровидный	2,8	2,95	-	3,00	-	-	0,17
P5-3,4	Аттачмент шаровидный	2,8	2,95	-	4,00	-	-	0,20
P5-3,5	Аттачмент шаровидный	2,8	2,95	-	5,00	-	-	0,24
P5-3,6	Аттачмент шаровидный	2,8	2,95	-	6,00	-	-	0,27
P5-3,1set	Набор аттачментов шаровидных - a+b+c	2,8	2,95	-	1,00	-	-	0,20
P5-3,2set	Набор аттачментов шаровидных - a+b+c	2,8	2,95	-	2,00	-	-	0,24
P5-3,3set	Набор аттачментов шаровидных - a+b+c	2,8	2,95	-	3,00	-	-	0,28
P5-3,4set	Набор аттачментов шаровидных - a+b+c	2,8	2,95	-	4,00	-	-	0,31
P5-3,5set	Набор аттачментов шаровидных - a+b+c	2,8	2,95	-	5,00	-	-	0,35
P5-3,6set	Набор аттачментов шаровидных - a+b+c	2,8	2,95	-	6,00	-	-	0,38
P5-3.75,1	Аттачмент шаровидный	3,5	4,10	-	1,10	-	-	0,11
P5-3.75,2	Аттачмент шаровидный	3,5	4,10	-	2,00	-	-	0,16
P5-3.75,3	Аттачмент шаровидный	3,5	4,10	-	3,00	-	-	0,20
P5-3.75,4	Аттачмент шаровидный	3,5	4,10	-	4,00	-	-	0,25
P5-3.75,5	Аттачмент шаровидный	3,5	4,10	-	5,00	-	-	0,29
P5-3.75,6	Аттачмент шаровидный	3,5	4,10	-	6,00	-	-	0,34
P5-3.75,1set	Набор аттачментов шаровидных - a+b+c	3,5	4,10	-	1,10	-	-	0,22
P5-3.75,2set	Набор аттачментов шаровидных - a+b+c	3,5	4,10	-	2,00	-	-	0,27
P5-3.75,3set	Набор аттачментов шаровидных - a+b+c	3,5	4,10	-	3,00	-	-	0,31
P5-3.75,4set	Набор аттачментов шаровидных - a+b+c	3,5	4,10	-	4,00	-	-	0,36
P5-3.75,5set	Набор аттачментов шаровидных - a+b+c	3,5	4,10	-	5,00	-	-	0,40
P5-3.75,6set	Набор аттачментов шаровидных - a+b+c	3,5	4,10	-	6,00	-	-	0,46
P5-3.75,20-1	Аттачмент угловой шаровидный 20° высотой 1мм	3,5	4,00	20	1,70	-	-	0,10
P5-3.75,20-2	Аттачмент угловой шаровидный 20° высотой 2мм	3,5	4,00	20	2,70	-	-	0,21
P5-3.75,20-3	Аттачмент угловой шаровидный 20° высотой 3мм	3,5	4,00	20	3,70	-	-	0,25
P5-	Аттачмент угловой шаровидный 20°	3,5	4,00	20	4,70	-	-	0,31

3.75,20-4	высотой 4мм							
P5-3.75,20-5	Аттачмент угловой шаровидный 20° высотой 5мм	3,5	4,00	20	5,70	-	-	0,36
P5-3.75,20-6	Аттачмент угловой шаровидный 20° высотой 6мм	3,5	4,00	20	6,70	-	-	0,40
P5-3.75,20-1set	Набор аттачмента углового шаровидного 20° высотой 1мм - a+b+c	3,5	4,00	20	1,70	-	-	0,21
P5-3.75,20-2set	Набор аттачмента углового шаровидного 20° высотой 2мм - a+b+c	3,5	4,00	20	2,70	-	-	0,26
P5-3.75,20-3set	Набор аттачмента углового шаровидного 20° высотой 3мм - a+b+c	3,5	4,00	20	3,70	-	-	0,30
P5-3.75,20-4set	Набор аттачмента углового шаровидного 20° высотой 4мм - a+b+c	3,5	4,00	20	4,70	-	-	0,35
P5-3.75,20-5set	Набор аттачмента углового шаровидного 20° высотой 5мм - a+b+c	3,5	4,00	20	5,70	-	-	0,41
P5-3.75,20-6set	Набор аттачмента углового шаровидного 20° высотой 6мм - a+b+c	3,5	4,00	20	6,70	-	-	0,45
P5-4.5,1	Шаровидный аттачмент - 1 мм	4,5	4,70	-	1,00	-	-	0,14
P5-4.5,2	Шаровидный аттачмент - 2 мм	4,5	4,70	-	2,00	-	-	0,20
P5-4.5,4	Шаровидный аттачмент - 3 мм	4,5	4,70	-	4,00	-	-	0,30
P5-4.5,1set	Набор шаровидных аттачментов - a+b+c	4,5	4,70	-	1,00	-	-	0,25
P5-4.5,2set	Набор шаровидных аттачментов - a+b+c	4,5	4,70	-	2,00	-	-	0,31
P5-4.5,4set	Набор шаровидных аттачментов - a+b+c	4,5	4,70	-	4,00	-	-	0,41
P5C-3,1	Шаровидный аттачмент с конической платформой	2,8	3,50	-	1,00	-	-	0,10
P5C-3,2	Шаровидный аттачмент с конической платформой	2,8	3,50	-	2,00	-	-	0,14
P5C-3,3	Шаровидный аттачмент с конической платформой	2,8	3,50	-	3,00	-	-	0,19
P5C-3,4	Шаровидный аттачмент с конической платформой	2,8	3,50	-	4,00	-	-	0,23
P5C-3,5	Шаровидный аттачмент с конической платформой	2,8	3,50	-	5,00	-	-	0,28
P5C-3,6	Шаровидный аттачмент с конической платформой	2,8	3,50	-	6,00	-	-	0,33
P5C-3,1set	Набор шаровидных аттачментов с	2,8	3,50	-	1,00	-	-	0,21

	конической платформой - a+ b+c							
P5C-3,2set	Набор шаровидных аттачментов с конической платформой - a+b+c	2,8	3,50	-	2,00	-	-	0,25
P5C-3,3set	Набор шаровидных аттачментов с конической платформой - a+b+c	2,8	3,50	-	3,00	-	-	0,30
P5C-3,4set	Набор шаровидных аттачментов с конической платформой - a+b+c	2,8	3,50	-	4,00	-	-	0,34
P5C-3,5set	Набор шаровидных аттачментов с конической платформой - a+b+c	2,8	3,50	-	5,00	-	-	0,39
P5C-3,6set	Набор шаровидных аттачментов с конической платформой - a+b+c	2,8	3,50	-	6,00	-	-	0,44
P5C-3,20-1	Аттачмент угловой шаровидный 20° высотой 1мм с конической платформой	2,8	4,00	20	1,00	-	-	0,10
P5C-3,20-2	Аттачмент угловой шаровидный 20° высотой 2мм с конической платформой	2,8	4,00	20	2,00	-	-	0,20
P5C-3,20-3	Аттачмент угловой шаровидный 20° высотой 3мм с конической платформой	2,8	4,00	20	3,00	-	-	0,26
P5C-3,20-4	Аттачмент угловой шаровидный 20° высотой 4мм с конической платформой	2,8	4,00	20	4,00	-	-	0,31
P5C-3,20-5	Аттачмент угловой шаровидный 20° высотой 5мм с конической платформой	2,8	4,00	20	5,00	-	-	0,36
P5C-3,20-6	Аттачмент угловой шаровидный 20° высотой 6мм с конической платформой	2,8	4,00	20	6,00	-	-	0,40
P5C-3,20-1set	Набор аттачментов угловых шаровидных 20° высотой 1 мм с конической платформой - a+b+c	2,8	4,00	20	1,00	-	-	0,21
P5C-3,20-2set	Набор аттачментов угловых шаровидных 20° высотой 2мм с конической платформой - a+b+c	2,8	4,00	20	2,00	-	-	0,31
P5C-3,20-	Набор аттачментов	2,8	4,00	20	3,00	-	-	0,37

3set	угловых шаровидных 20° высотой 3мм с конической платформой - a+b+c							
P5C-3,20- 4set	Набор аттачментов угловых шаровидных 20° высотой 4мм с конической платформой - a+b+c	2,8	4,00	20	4,00	-	-	0,42
P5C-3,20- 5set	Набор аттачментов угловых шаровидных 20° высотой 5мм с конической платформой - a+b+c	2,8	4,00	20	5,00	-	-	0,47
P5C-3,20- 6set	Набор аттачментов угловых шаровидных 20° высотой 6мм с конической платформой - a+b+c	2,8	4,00	20	6,00	-	-	0,51
P5C-4,1	Аттачмент шаровидный конической платформой	3,35	3,50	-	1,00	-	-	0,12
P5C-4,2	Аттачмент шаровидный конической платформой	3,35	3,50	-	2,00	-	-	0,17
P5C-4,3	Аттачмент шаровидный конической платформой	3,35	3,50	-	3,00	-	-	0,21
P5C-4,4	Аттачмент шаровидный конической платформой	3,35	3,50	-	4,00	-	-	0,27
P5C-4,5	Аттачмент шаровидный конической платформой	3,35	3,50	-	5,00	-	-	0,30
P5C-4,6	Аттачмент шаровидный с конической платформой	3,35	3,50	-	6,00	-	-	0,36
P5C-4,1set	Набор аттачмента шаровидного с конической платформой - a+b+c	3,35	3,50	-	1,00	-	-	0,22
P5C-4,2set	Набор аттачмента шаровидного с конической платформой - a+ b+c	3,35	3,50	-	2,00	-	-	0,28
P5C-4,3set	Набор аттачмента шаровидного с конической платформой - a+ b+c	3,35	3,50	-	3,00	-	-	0,32
P5C-4,4set	Набор аттачмента шаровидного с конической платформой - a+ b+c	3,35	3,50	-	4,00	-	-	0,38
P5C-4,5set	Набор аттачмента шаровидного с конической платформой - a+ b+c	3,35	3,50	-	5,00	-	-	0,41
P5C-4,6set	Набор аттачмента шаровидного с конической платформой - a+ b+c	3,35	3,50	-	6,00	-	-	0,47
P5C-4,20- 1	Аттачмент угловой шаровидный 20°	3,35	4,00	20	1,80	-	-	0,11

	высотой 1 мм с конической платформой							
P5C-4,20- 2	Аттачмент угловой шаровидный 20° высотой 2мм с конической платформой	3,35	4,00	20	2,80	-	-	0,22
P5C-4,20- 3	Аттачмент угловой шаровидный 20° высотой 3мм с конической платформой	3,35	4,00	20	3,80	-	-	0,27
P5C-4,20- 4	Аттачмент угловой шаровидный 20° высотой 4мм с конической платформой	3,35	4,00	20	4,80	-	-	0,32
P5C-4,20- 5	Аттачмент угловой шаровидный 20° высотой 5мм с конической платформой	3,35	4,00	20	5,80	-	-	0,38
P5C-4,20- 6	Аттачмент угловой шаровидный 20° высотой 6мм с конической платформой	3,35	4,00	20	6,80	-	-	0,45
P5C-4,20- 1set	Набор аттачмента углового шаровидного 20° высотой 1мм с конической платформой - a+b+c	3,35	4,00	20	1,80	-	-	0,23
P5C-4,20- 2set	Набор аттачмента углового шаровидного 20° высотой 2мм с конической платформой - a+b+c	3,35	4,00	20	2,80	-	-	0,33
P5C-4,20- 3set	Набор аттачмента углового шаровидного 20° высотой 3мм с конической платформой - a+b+c	3,35	4,00	20	3,80	-	-	0,38
P5C-4,20- 4set	Набор аттачмента углового шаровидного 20° высотой 4мм с конической платформой - a+b+c	3,35	4,00	20	4,80	-	-	0,43
P5C-4,20- 5set	Набор аттачмента углового шаровидного 20° высотой 5мм с конической платформой - a+b+c	3,35	4,00	20	5,80	-	-	0,49
P5C-4,20- 6set	Набор аттачмента углового шаровидного 20° высотой 6мм с конической платформой - a+b+c	3,35	4,00	20	6,80	-	-	0,55
P5C-4.5,1	Аттачмент шаровидный высотой 1мм с конической платформой	4,5	4,50	-	1,00	-	-	0,12
P5C-4.5,2	Аттачмент шаровидный	4,5	4,50	-	2,00	-	-	0,18

	высотой 2мм с конической платформой							
P5C-4.5,4	Аттачмент шаровидный высотой 4мм с конической платформой	4,5	4,50	-	4,00	-	-	0,23
P5-I6B,1	Аттачмент шаровидный для имплантата I6B	3,2	3,75	-	1,00	-	-	0,20
P5-I6B,2	Аттачмент шаровидный для имплантата I6B	3,2	3,75	-	2,00	-	-	0,35
P5-I6B,3	Аттачмент шаровидный для имплантата I6B	3,2	3,75	-	3,00	-	-	0,49
P5-I6B,1set	Набор аттачмента шаровидного для имплантата I6B - a+b+c	3,2	3,75	-	1,00	-	-	0,31
P5-I6B,2set	Набор аттачмента шаровидного для имплантата I6B - a+b+c	3,2	3,75	-	2,00	-	-	0,46
P5-I6B,3set	Набор аттачмента шаровидного для имплантата I6B - a+b+c	3,2	3,75	-	3,00	-	-	0,60

10.4 Колпачки:

Защитный колпачок одевается на абатмент, препятствует проникновению бактерий в область платформы имплантата на время изготовления финальной реставрации.

10.4.1 Пластиковые колпачки


Поставляются трёх степеней твёрдости, от наиболее жёсткого до наиболее мягкого. Колпачки фиксируются на абатменте путём защёлкивания.



10.4.2 Колпачок металлический



10.4.3 Колпачок силиконовый

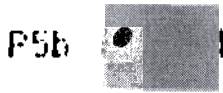

Выпускаются трех степеней жесткости: мягкий, стандартный, жесткий.

Номер по каталогу	Описание	Диаметр, D (мм)	Диаметр, D1 (мм)	Угол, а (°)	Длина L (мм)	Длина LS (мм)	Длина LS1 (мм)	Вес (г)
P5a	Колпачок металлический	-	5,00	-	3,20	-	-	0,10
P5b-1	Колпачок силиконовый - мягкий	-	-	-	-	-	-	0,01
P5b-1.8	Колпачок силиконовый, диаметр 1.8 мм	-	1,8	-	-	-	-	0,01
P5b-2	Колпачок силиконовый - стандартный	-	-	-	-	-	-	0,01

P5b-2.2	Колпачок силиконовый, диаметр 2,2 мм	-	2,2	-	-	-	-	0,01
P5b-3	Колпачок силиконовый - жесткий	-	-	-	-	-	-	0,01
P5b-t	Колпачок силиконовый	-	-	-	-	-	-	0,10
P25a	Колпачок металлический	-	-	-	-	-	-	0,05
P25-a,b/10	Колпачки силиконовые прямые	-	-	-	-	-	-	0,53
P25-a,b/20	Колпачки силиконовые угловые	-	-	-	-	-	-	0,53
P55a	Колпачок металлический	-	-	-	-	-	-	0,05
P55b-1	Колпачок силиконовый	-	-	-	-	-	-	0,01
P55b-2	Колпачок силиконовый	-	-	-	-	-	-	0,01
P55b-3	Колпачок силиконовый	-	-	-	-	-	-	0,01

10.5 Диск защитный P5d




Защитный диск устанавливается на металлический / силиконовый колпачок.

Номер по каталогу	Описание	Диаметр, D (мм)	Диаметр, D1 (мм)	Угол, а (°)	Длина L (мм)	Длина LS (мм)	Длина LS1 (мм)	Вес (г)
P5d	Диск защитный	-	-	-	-	-	-	0,01
P5pd	Диск защитный	-	-	-	-	-	-	0,01

10.6 Трансферы

Оттисковые трансферы предназначены для точного переноса положения имплантата на гипсовую модель.


10.6.1 Трансфер D2

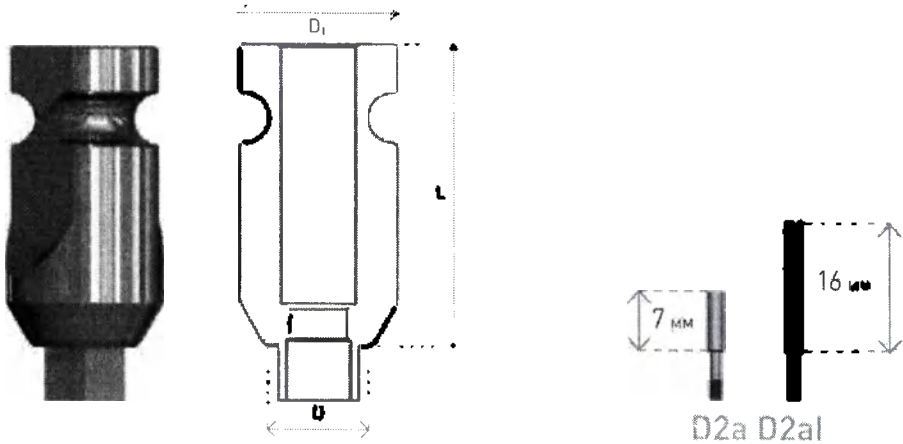

Трансфер с шестигранником выполнен из нержавеющей стали. Поставляются трансферы как для открытой оттисковой ложки — с острой режущей кромкой и длинным винтом, так и для закрытой оттисковой ложки — с закруглённой кромкой и коротким винтом. Также поставляются трансферы с плоским соединением.

Трансферы выпускаются с винтами D2a или D2al (короткий винт — для закрытой оттисковой ложки, длинный винт — для открытой оттисковой ложки)

10.6.2 Трансфер с клипсовой фиксацией D3

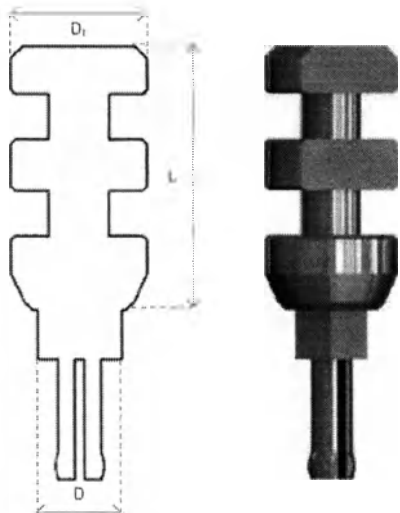


Трансфер с клипсовой фиксацией без фиксирующего винта. Предназначен для снятия оттиска высокой точности методом закрытой ложки. Особенно эффективен для работы в дистальных отделах, где есть дефицит места для работы с ключом. Трансфер с клипсовой фиксацией остаётся в промежуточной модели в течение всего процесса. Важно: подходит только для параллельных имплантатов.

При использовании однокомпонентного трансфера с клипсовой фиксацией не требуется применять фиксирующий винт. Этот упрощённый метод получения слепка удобно применять на задних зубах, где нехватка места не позволяет использовать ни винт, ни ключ для крепления.

Для удобства потребителя трансферы выпускаются в наборах:

Трансфер пластиковый с абатментом D4-3.75,1 (Plastic Snap Transfer with Abutment):

1. Абатмент анатомический антиротационный (Anatomic Anti - rotation Abutment), PK-P3-1;
2. Аналог имплантата (Implant Analog), D1-3.75;
3. Трансфер пластиковый (Plastic Transfer), PK-D2-3.75 (2 units).

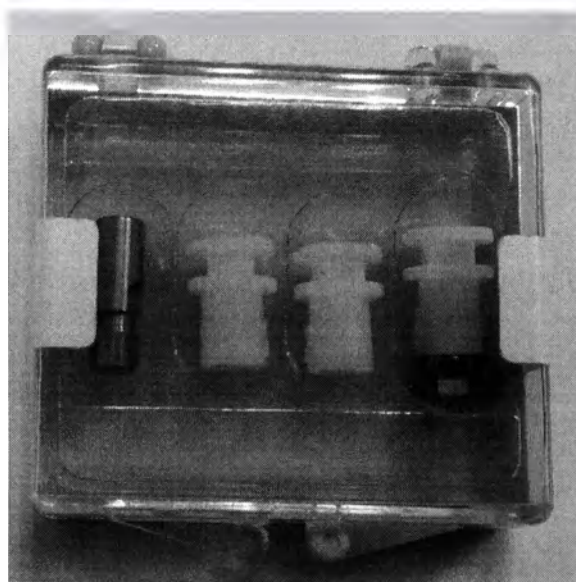

Трансфер пластиковый с абатментом D4-3.75,2 (Plastic Snap Transfer with Abutment):

1. Абатмент анатомический антиротационный (Anatomic Anti - rotation Abutment), PK-P3-2;
2. Аналог имплантата (Implant Analog), D1-3.75;

3. Трансфер пластиковый (Plastic Transfer), PK-D2-3.75 (2 units).

Трансфер пластиковый с абатментом D4-3.75,3 (Plastic Snap Transfer with Abutment):

1. Абатмент анатомический антиротационный (Anatomic Anti - rotation Abutment), PK-P3-3;
2. Аналог имплантата (Implant Analog), D1-3.75;
3. Трансфер пластиковый (Plastic Transfer), PK-D2-3.75 (2 units).

Трансфер пластиковый с абатментом D4-3.75,4 (Plastic Snap Transfer with Abutment):

1. Абатмент анатомический антиротационный (Anatomic Anti - rotation Abutment), PK-P3-4;
2. Аналог имплантата (Implant Analog), D1-3.75;
3. Трансфер пластиковый (Plastic Transfer), PK-D2-3.75 (2 units).

Упаковка трансфер пластиковый с абатментом - 10 штук D4-3.75,1Pack (Package of Plastic Snaps Transfer with Abutment-10 units):

Трансфер пластиковый с абатментом (Plastic Snap Transfer with Abutment), D4-3.75,1.

Упаковка трансфер пластиковый с абатментом - 10 штук D4-3.75,2Pack (Package of Plastic Snaps Transfer with Abutment-10 units):

Трансфер пластиковый с абатментом (Plastic Snap Transfer with Abutment), D4-3.75,2.

Упаковка трансфер пластиковый с абатментом - 10 штук D4-3.75,3Pack (Package of Plastic Snaps Transfer with Abutment-10 units):

Трансфер пластиковый с абатментом (Plastic Snap Transfer with Abutment), D4-3.75,3.

Упаковка трансфер пластиковый с абатментом - 10 штук D4-3.75,4Pack (Package of Plastic Snaps Transfer with Abutment-10 units):

Трансфер пластиковый с абатментом (Plastic Snap Transfer with Abutment), D4-3.75,4.

Номер по каталогу	Описание	Диаметр, D (мм)	Диаметр, D1 (мм)	Угол, α (°)	Длина L (мм)	Длина LS (мм)	Длина LS1 (мм)	Вес (г)
PK-D2-3	Трансфер пластиковый	3	5,38	-	10,00	-	-	0,19
PK-D2-3.75	Трансфер пластиковый	3,5	5,38	-	10,00	-	-	0,19
D2-3,9	Трансфер для закрытой оттисковой ложки	2,8	3,75	-	9,30	-	-	0,46
D2-3.75,15	Трансфер для закрытой оттисковой ложки	3,5	4,80	-	12,90	-	-	1,45
D2-3.75,9	Трансфер для закрытой оттисковой ложки	3,5	4,80	-	8,90	-	-	0,92
D2-4.5,15	Трансфер для закрытой оттисковой ложки	4,5	4,50	-	15,00	-	-	1,52
D2-4.5,9	Трансфер для закрытой оттисковой ложки	4,5	4,50	-	9,00	-	-	0,95
D2C-3,15	Трансфер для закрытой оттисковой ложки для конической платформы	2,8	4,70	-	15,00	-	-	1,38
D2C-3,9	Трансфер для закрытой оттисковой ложки для конической платформы	2,8	4,70	-	9,00	-	-	0,86
D2C-4,15	Трансфер для закрытой оттисковой ложки для конической платформы	3,35	4,80	-	12,35	-	-	1,61
D2C-4,9	Трансфер для закрытой оттисковой ложки для конической платформы	3,35	4,80	-	9,00	-	-	1,08
D2-I6	Трансфер для имплантата I6	3,5	3,80	-	12,70	-	-	0,88

D2-I6B	Трансфер для имплантата I6B	3,5	5,00	-	10,00	-	-	0,82
D2-I7-3.75	Трансфер для имплантата I7 диаметр 3.75	3,5	3,50	-	10,00	-	-	0,08
D2-I7-4.2	Трансфер для имплантата I7 диаметр 4.2	4,2	4,20	-	10,00	-	-	0,12
D2-I7-5	Трансфер для имплантата I7 диаметр 5	5	5,00	-	10,00	-	-	0,15
D2N-3.75,15	Трансфер узкий для закрытой оттисковой ложки	3,5	3,80	-	12,85	-	-	0,57
D2N-3.75,9	Трансфер узкий для закрытой оттисковой ложки	3,5	3,80	-	9,00	-	-	0,45
D2NO-3.75,15	Трансфер узкий для открытой оттисковой ложки	3,5	3,80	-	15,00	-	-	0,59
D2NO-3.75,9	Трансфер узкий для открытой оттисковой ложки	3,5	3,80	-	9,00	-	-	0,47
D2N-P12-3.75,15	Трансфер узкий для абатмента с плоским соединением	3,5	3,50	-	15,00	-	-	1,03
D2N-P12-3.75,9	Трансфер узкий для абатмента с плоским соединением	3,5	3,50	-	9,00	-	-	0,81
D2O-3,15	Трансфер для открытой оттисковой ложки	3	3,75	-	15,00	-	-	1,61
D2O-3.75,15	Трансфер для открытой оттисковой ложки	3,5	4,80	-	15,00	-	-	1,75
D2O-3.75,9	Трансфер для открытой оттисковой ложки	3,5	4,80	-	9,00	-	-	1,18
D2O-4.5,15	Трансфер для открытой оттисковой ложки	4,5	4,80	-	15,00	-	-	1,54
D2O-4.5,9	Трансфер для открытой оттисковой ложки	4,5	4,80	-	9,00	-	-	1,02
D2OC-3,15	Трансфер для открытой оттисковой ложки для конической платформы	2,8	4,70	-	15,00	-	-	1,37
D2OC-3,9	Трансфер для открытой оттисковой ложки для конической платформы	2,8	4,70	-	9,00	-	-	0,92
D2OC-4,15	Трансфер для открытой оттисковой ложки для конической платформы	3,35	4,80	-	15,00	-	-	1,48
D2OC-4,9	Трансфер для открытой оттисковой ложки для конической платформы	3,35	4,80	-	9,00	-	-	0,96
D2-P12-3.75,15	Трансфер для абатмента с плоским соединением	3,5	4,80	-	13,00	-	-	1,49
D2-P12-3.75,9	Трансфер для абатмента с плоским соединением	3,5	4,80	-	9,00	-	-	1,11
D2-P12-4.5,9	Трансфер для абатмента с плоским соединением	4,5	4,80	-	9,00	-	-	1,17
D2-P14	Трансфер для углового адаптера	-	4,40	-	12,50	-	-	0,29


D2-P24	Трансфер для одноэтапного углового адаптера	-	4,00	-	9,00	-	-	1,07
D2-P6	Трансфер для Р6	3,5	4,00	-	10,00	-	-	0,81
D2-P6H	Трансфер для эстетического абатмента Р6Н	3,5	4,70	-	8,00	-	-	0,78
D2-P7	Трансфер для Р7	3,5	4,70	-	8,00	-	-	0,85
D3-3.75,15	Трансфер с клипсовой фиксацией	3,5	4,50	-	12,65	-	-	1,12
D3-3.75,9	Трансфер с клипсовой фиксацией	3,5	4,50	-	8,55	-	-	0,71
D3-4.5,15	Трансфер с клипсовой фиксацией	4,5	4,50	-	15,00	-	-	1,26
D3-4.5,9	Трансфер с клипсовой фиксацией	4,5	4,50	-	9,00	-	-	0,84
D3N- 3.75,15	Трансфер узкий с клипсовой фиксацией	3,5	3,50	-	13,00	-	-	1,10
D3N- 3.75,9	Трансфер узкий с клипсовой фиксацией	3,5	3,50	-	9,00	-	-	0,71
D3NC- 3,15	Трансфер узкий с клипсовой фиксацией с конической платформой	2,8	3,00	-	15,00	-	-	1,08
D3NC-3,9	Трансфер узкий с клипсовой фиксацией с конической платформой	2,8	3,00	-	9,00	-	-	0,66
D3NC- 4,15	Трансфер узкий с клипсовой фиксацией с конической платформой	3,35	3,75	-	15,00	-	-	1,27
D3NC-4,9	Трансфер узкий с клипсовой фиксацией с конической платформой	3,35	3,75	-	9,00	-	-	0,93
D3C-3,9	Трансфер с клипсовой фиксацией с конической платформой	3,5	4,50	-	8,55	-	-	0,71
D3C-3,9	Трансфер с клипсовой фиксацией с конической платформой	3,5	4,5	-	8,55	-	-	0,71
D3C-3,15	Трансфер с клипсовой фиксацией с конической платформой	3,5	4,50	-	12,65	-	-	1,12
D3C-4,9	Трансфер с клипсовой фиксацией с конической платформой	4,5	4,50	-	9,00	-	-	0,84
D3C-4,15	Трансфер с клипсовой фиксацией с конической платформой	4,5	4,50	-	15,00	-	-	1,26
D4-3.75,1	Трансфер пластиковый с абатментом	-	-	-	-	-	-	0,23
D4- 3.75,1Pack	Упаковка трансфер пластиковый с абатментом - 10 штук	-	-	-	-	-	-	8,70

D4-3.75,2	Трансфер пластиковый с абатментом	-	-	-	-	-	-	0,35
D4-3.75,2Pack	Упаковка трансфер пластиковый с абатментом - 10 штук	-	-	-	-	-	-	8,81
D4-3.75,3	Трансфер пластиковый с абатментом	-	-	-	-	-	-	0,47
D4-3.75,3Pack	Упаковка трансфер пластиковый с абатментом - 10 штук	-	-	-	-	-	-	8,93
D4-3.75,4	Трансфер пластиковый с абатментом	-	-	-	-	-	-	0,58
D4-3.75,4Pack	Упаковка трансфер пластиковый с абатментом - 10 штук	-	-	-	-	-	-	9,04

10.7 Аналоги


Аналоги предназначены для переноса позиции различных ортопедических элементов, установленных во рту пациента, на зуботехническую гипсовую модель.

10.7.1 Аналог D1

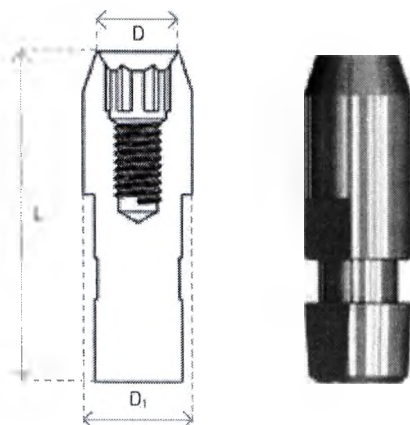

Аналог D1 выполнен из нержавеющей стали для изготовления лабораторных моделей. Поставляются конфигурации, имеющие 3 различных диаметра: 3.75, 5, 6. Платформа с внутренним шестигранником имеет диаметр 2 мм.

10.7.2 Аналог D1-I6

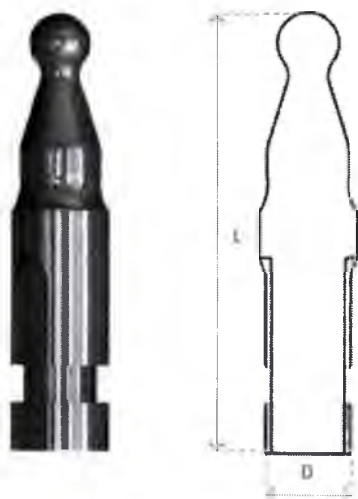

10.7.3 Аналог для P24




D1-P24

Номер по каталогу	Описание	Диаметр, D (мм)	Диаметр, D1 (мм)	Угол, а (°)	Длина L (мм)	Длина LS (мм)	Длина LS1 (мм)	Вес (г)
PK-D1-3	Аналог имплантата	3	5,00	-	15,00	-	-	0,90
PK-D1-3.75	Аналог имплантата	3,5	5,00	-	15,00	-	-	0,87
D1-3	Аналог	2,8	3,00	-	12,00	-	-	0,90
D1-3.75	Аналог	3,5	4,00	-	12,00	-	-	0,87
D1-4.5	Аналог	3,5	4,50	-	12,00	-	-	0,90
D1-5	Аналог	3,5	5,00	-	12,30	-	-	0,99
D1-6	Аналог	3,5	6,00	-	12,30	-	-	1,81
D1C-3	Аналог с конической платформой	2,8	3,00	-	12,00	-	-	0,87
D1C-4	Аналог с конической платформой	3,35	4,00	-	12,00	-	-	0,95
D1-I6	Аналог имплантата для I6	4	4,00	-	8,30	-	-	1,66
D1-I6b	Аналог имплантата для I6b	4	4,00	-	12,00	-	-	1,27
D1-P14	Аналог для P14	4,5	4,50	-	12,00	-	-	1,25
D1-P24	Аналог для P24	4	4,00	-	11,00	-	-	1,33
D1-P6	Аналог для P6	3,5	4,05	-	12,00	-	-	1,41
D1-P6H	Аналог для P6H	3,5	4,70	-	12,30	-	-	1,45
D1-P7	Аналог для P7	3,5	4,70	-	12,00	-	-	0,99

10.8 Адаптеры

10.8.1 Адаптер прямой P16

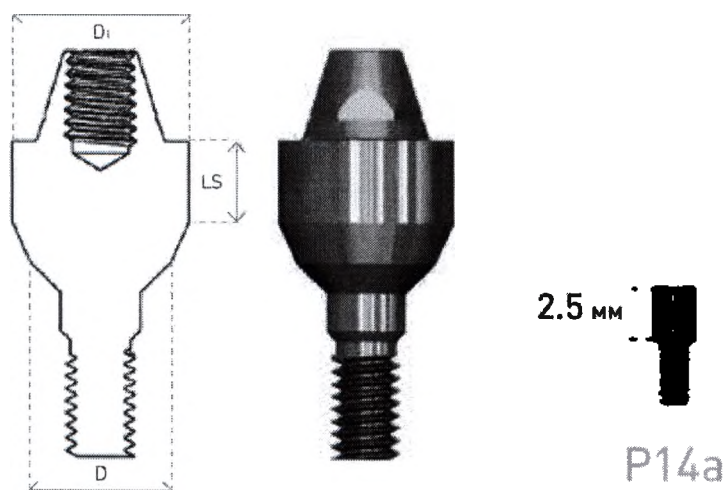


P14a

Прямой адаптер изготовлен из титана. Облегчает установку съёмных протезов на непараллельно установленных имплантатах. Верхний конус позволяет устранить остаточную

непараллельность. Снятие оттиска производится поверх установленных адаптеров. Протез привинчивается к конусу.

Адаптер P16 поставляется с винтом P14a.

10.8.2 Адаптер угловой P14

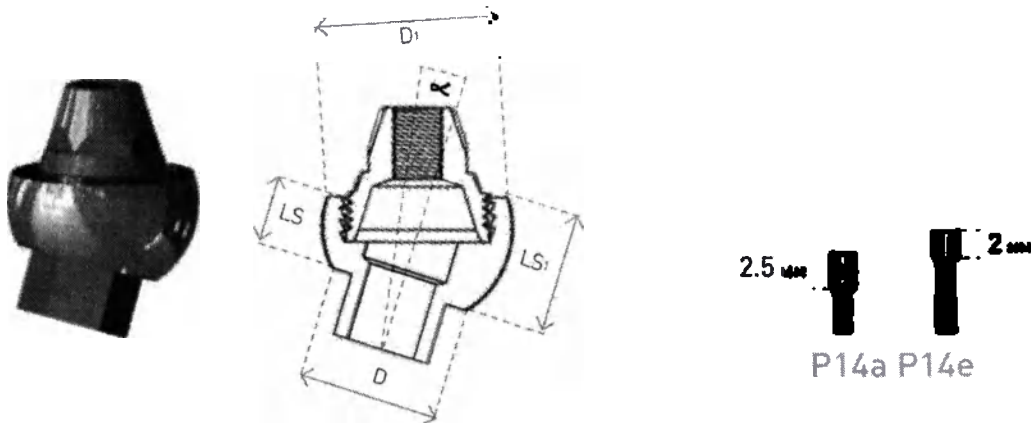


Адаптер (основание и конус) используется для протезирования с винтовой фиксацией и делает возможным протезирование на непараллельных имплантатах путём корректировки угла посадки имплантата. Угол имплантата корректируется с помощью основания. Имеются в наличии основания с углами 17° и 30° и высотой 1 и 3 мм. Конус позволяет соединить временный титановый абатмент или постоянный абатмент с пластиковой манжетой для отливки супраструктур.

Данный адаптер является прекрасным ортопедическим решением для протезирования «Все на четырёх» («All on four»). Конус должен быть закручен при помощи динамометрического ключа с моментом вращения 30 Нсм. Формирователь десны должен быть закручен при помощи динамометрического ключа с моментом вращения 20 Нсм. Благодаря этому, во время снятия формирователя десны, конус останется на месте, а не снимется вместе с ним.

Адаптер P14 выпускается с винтами P14a и P14e.

10.8.3 Адаптер угловой одноэтапный P24

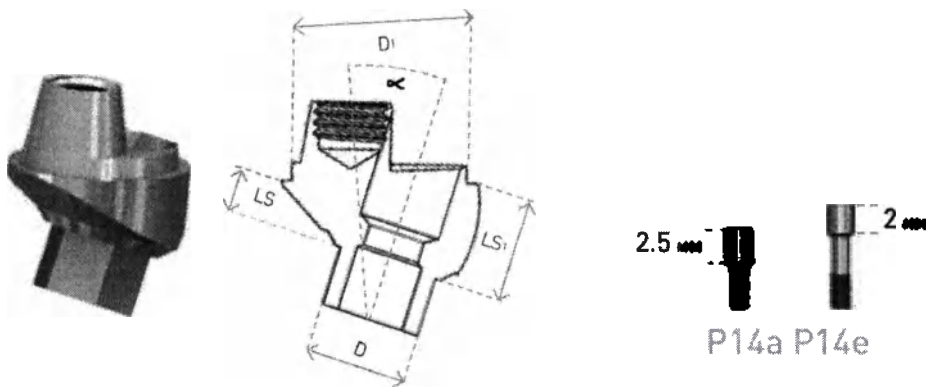

Адаптер (основание и металлическая манжета) используется для протезирования на основе винтовой фиксации и позволяет осуществлять протезирование на непараллельных имплантатах, корректируя остаточную непараллельность имплантата. Выпускаются адаптеры с углом 17°, 30° и 40° высотой 1 мм и 3 мм. В комплект входят винты P14e и P14a.

Номер по каталогу	Описание	Диаметр, D (мм)	Диаметр, D1 (мм)	Угол, α (°)	Длина L (мм)	Длина LS (мм)	Длина LS1 (мм)	Вес (г)
P5-P14,1	Адптер шаровидный	3,5	4,40	-	1,00	-	-	0,09
P5-P14,2	Адптер шаровидный	3,5	4,40	-	2,00	-	-	0,11
P12C-	Адаптер абатмента с плоским соединением	3,5	3,75	-	2,00	-	-	0,19

3.75,3								
P12C-3.75,5	Адаптер абатмента с плоским соединением	3,5	3,75	-	2,00	-	-	0,20
P14-3.75,17-1	Адаптер угловой	3,5	4,50	17	-	1,35	###	0,24
P14-3.75,17-3	Адаптер угловой	3,5	4,50	17	-	2,90	###	0,30
P14-3.75,30-1	Адаптер угловой	3,5	4,50	30	-	1,20	###	0,25
P14-3.75,30-3	Адаптер угловой	3,5	4,50	30	-	2,75	###	0,31
P14C-3,17-1	Адаптер угловой с конической платформой	2,8	4,50	17	-	1,00	###	0,22
P14C-3,17-3	Адаптер угловой с конической платформой	2,8	4,50	17	-	3,00	###	0,28
P14C-3,30-1	Адаптер угловой с конической платформой	2,8	4,50	30	-	1,00	###	0,23
P14C-3,30-3	Адаптер угловой с конической платформой	2,8	4,50	30	-	3,00	###	0,30
P14C-4,17-1	Адаптер угловой с конической платформой	3,35	4,50	17	-	1,00	###	0,26
P14C-4,17-3	Адаптер угловой с конической платформой	3,35	4,50	17	-	3,00	###	0,32
P14C-4,30-1	Адаптер угловой с конической платформой	3,35	4,50	30	-	1,00	###	0,27
P14C-4,30-3	Адаптер угловой с конической платформой	3,35	4,50	30	-	3,00	###	0,32
P16-3,1	Адаптер прямой	2,8	4,40	-	1,00	-	-	0,20
P16-3,2	Адаптер прямой	2,8	4,40	-	2,00	-	-	0,24
P16-3,3	Адаптер прямой	2,8	4,40	-	3,00	-	-	0,27
P16-3,4	Адаптер прямой	2,8	4,40	-	4,00	-	-	0,31
P16-3,5	Адаптер прямой	2,8	4,40	-	5,00	-	-	0,35
P16-3.75,1	Адаптер прямой	3,5	4,40	-	1,00	-	-	0,22
P16-3.75,2	Адаптер прямой	3,5	4,40	-	2,00	-	-	0,25
P16-3.75,3	Адаптер прямой	3,5	4,40	-	3,00	-	-	0,28
P16-3.75,4	Адаптер прямой	3,5	4,40	-	4,00	-	-	0,33
P16-3.75,5	Адаптер прямой	3,5	4,40	-	5,00	-	-	0,37
P16C-3,1	Адаптер прямой с конической платформой	2,8	4,40	-	1,00	-	-	0,20
P16C-3,2	Адаптер прямой с конической платформой	2,8	4,40	-	2,00	-	-	0,25
P16C-3,3	Адаптер прямой с конической платформой	2,8	4,40	-	3,00	-	-	0,28
P16C-3,4	Адаптер прямой с конической платформой	2,8	4,40	-	4,00	-	-	0,30
P16C-3,5	Адаптер прямой с	2,8	4,50	-	5,00	-	-	0,36


	конической платформой							
P16C-4,1	Адаптер прямой с конической платформой	3,35	4,50	•	1,00	-	-	0,24
P16C-4,2	Адаптер прямой с конической платформой	3,35	4,50	•	2,00	-	-	0,27
P16C-4,3	Адаптер прямой с конической платформой	3,35	4,50	•	3,00	-	•	0,29
P16C-4,4	Адаптер прямой с конической платформой	3,35	4,50	-	4,00	-	-	0,35
P16C-4,5	Адаптер прямой с конической платформой	3,35	4,50	-	5,00	-	-	0,38
P24-3.75,17-1	Адаптер угловой одноэтапный	3,5	4,10	17	-	1,00	###	0,17
P24-3.75,17-3	Адаптер угловой одноэтапный	3,5	4,10	17	-	3,00	###	0,22
P24-3.75,30-1	Адаптер угловой одноэтапный	3,5	4,10	30	-	1,00	###	0,18
P24-3.75,30-3	Адаптер угловой одноэтапный	3,5	4,10	30	-	3,00	###	0,23
P24-3.75,42-1	Адаптер угловой одноэтапный	3,5	4,10	42	-	1,00	###	0,19
P24-3.75,42-3	Адаптер угловой одноэтапный	3,5	4,10	42	-	3,00	###	0,24
P24C-4,17-1	Адаптер угловой одноэтапный с конической платформой	3,35	4,10	17	•	1,00	###	0,18
P24C-4,17-3	Адаптер угловой одноэтапный с конической платформой	3,35	4,10	17	•	3,00	###	0,23
P24C-4,30-1	Адаптер угловой одноэтапный с конической платформой	3,35	4,10	30	-	1,00	###	0,19
P24C-4,30-3	Адаптер угловой одноэтапный с конической платформой	3,35	4,10	30	•	3,00	###	0,24

10.9 Абатмент Локатор

Номер по каталогу	Описание	Диаметр, D (мм)	Диаметр, D1 (мм)	Угол, α (°)	Длина L (мм)	Длина LS (мм)	Длина LS1 (мм)	Вес (г)
P25-3.75,0	Локатор, диаметр 3.75, высота 0 мм	3,5	3,90	-	0,00	-	-	0,08
P25-3.75,1	Локатор, диаметр 3.75, высота 1 мм	3,5	3,90	-	1,00	-	-	0,10
P25-3.75,2	Локатор, диаметр 3.75, высота 2 мм	3,5	3,90	-	2,00	-	-	0,14
P25-3.75,3	Локатор, диаметр 3.75, высота 3 мм	3,5	3,90	-	3,00	-	-	0,27
P25-3.75,4	Локатор, диаметр 3.75,	3,5	3,90	-	4,00	-	-	0,32

	высота 4 мм							
P25-3.75,5	Локатор, диаметр 3.75, высота 5 мм	3,5	3,90	-	5,00	-	-	0,37
P25-3.75,6	Локатор, диаметр 3.75, высота 6 мм	3,5	3,90	-	6,00	-	-	0,42
P25-3.75,7	Локатор, диаметр 3.75, высота 7 мм	3,5	3,90	-	7,00	-	-	0,48
P25-3.75,8	Локатор, диаметр 3.75, высота 8 мм	3,5	3,90	-	8,00	-	-	0,54
P25-3.75,9	Локатор, диаметр 3.75, высота 9 мм	3,5	3,90	-	9,00	-	-	0,60

10.10 Коннектор малый P55

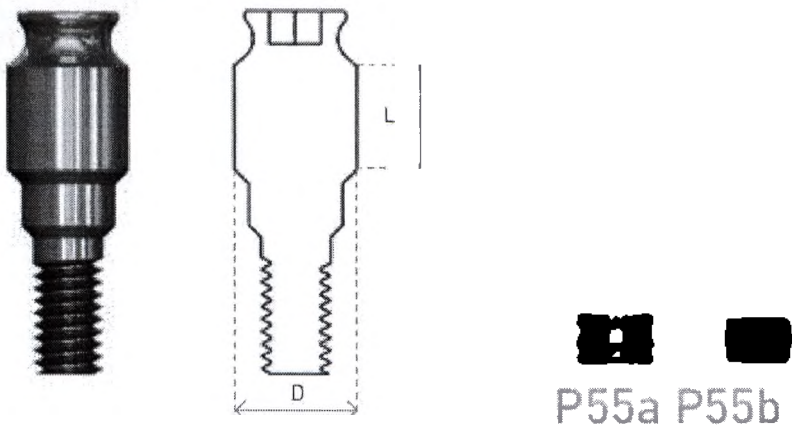

Коннектор малый P55 — это инновационная система фиксации протезов, которая характеризуется, прежде всего, очень малой высотой, что способствует лёгкому соединению съёмного протеза и имплантата. Малый коннектор P55 открывает новые возможности для восстановления зубного ряда с помощью съёмных протезов, значительно повышая качество жизни пациента. Выпускаются модели разной высоты: 1 - 8мм.

Преимущества:

Малая высота даёт стоматологу возможность установить накладной протез даже в тех случаях, когда межокклюзионное пространство ограничено.

Высокая удерживающая способность.

Лёгкость и простота использования.

Модель P55 может быть установлена с помощью обычного ключа для абатментов.

Нет необходимости в специальном инструменте.

P55 поставляется в комплекте с металлическим и силиконовым колпачками P55a и P55b.


Номер по каталогу	Описание	Диаметр, D (мм)	Диаметр, D1 (мм)	Угол, а (°)	Длина L (мм)	Длина LS (мм)	Длина LS1 (мм)	Вес (г)
P55-3,1	Коннектор малый, диаметр 3, длина 1	2,8	3,00	-	0,50	-	-	0,09
P55-3,2	Коннектор малый, диаметр 3, длина 2	2,8	3,00	-	1,50	-	-	0,13
P55-3,3	Коннектор малый, диаметр 3, длина 3	2,8	3,00	-	2,50	-	-	0,17
P55-3,4	Коннектор малый, диаметр 3, длина 4	2,8	3,00	-	3,50	-	-	0,22
P55-3.75,1	Коннектор малый, диаметр 3,75, длина 1	3,5	3,50	-	0,50	-	-	0,10
P55-3.75,2	Коннектор малый, диаметр 3,75, длина 2	3,5	3,50	-	1,50	-	-	0,15
P55-3.75,3	Коннектор малый, диаметр 3,75, длина 3	3,5	3,50	-	2,50	-	-	0,19

P55-3.75,4	Коннектор малый, диаметр 3,75, длина 4	3,5	3,50	-	3,50	-	-	0,23
P55-3.75,5	Коннектор малый, диаметр 3,75, длина 5	3,5	3,50	-	4,50	-	-	0,28
P55-3.75,6	Коннектор малый, диаметр 3,75, длина 6	3,5	3,50	-	5,50	-	-	0,33
P55-3.75,7	Коннектор малый, диаметр 3,75, длина 7	3,5	3,50	-	6,50	-	-	0,40
P55-3.75,8	Коннектор малый, диаметр 3,75, длина 8	3,5	3,50	-	7,50	-	-	0,46
P55C-3,1	Коннектор малый, диаметр 3, длина 1 с конической платформой	2,8	4,00	-	0,50	-	-	0,10
P55C-3,2	Коннектор малый, диаметр 3, длина 2 с конической платформой	2,8	4,00	-	1,50	-	-	0,14
P55C-3,3	Коннектор малый, диаметр 3, длина 3 с конической платформой	2,8	4,00	-	2,50	-	-	0,18
P55C-3,4	Коннектор малый, диаметр 3, длина 4 с конической платформой	2,8	4,00	-	3,50	-	-	0,25
P55C-3,5	Коннектор малый, диаметр 3, длина 5 с конической платформой	2,8	4,00	-	4,50	-	-	0,30
P55C-3,6	Коннектор малый, диаметр 3, длина 6 с конической платформой	2,8	4,00	-	5,50	-	-	0,41
P55C-3,7	Коннектор малый, диаметр 3, длина 7 с конической платформой	2,8	4,00	-	6,50	-	-	0,48
P55C-3,8	Коннектор малый, диаметр 3, длина 8 с конической платформой	2,8	4,00	-	7,50	-	-	0,48
P55C-4,1	Коннектор малый, диаметр 4, длина 1 с конической платформой	3,35	3,70	-	1,00	-	-	0,12
P55C-4,2	Коннектор малый, диаметр 4, длина 2 с конической платформой	3,35	4,00	-	2,00	-	-	0,17
P55C-4,3	Коннектор малый, диаметр 4, длина 3 с конической платформой	3,35	4,00	-	3,00	-	-	0,20
P55C-4,4	Коннектор малый, диаметр 4, длина 4 с конической платформой	3,35	4,00	-	4,00	-	-	0,28
P55C-4,5	Коннектор малый, диаметр 4, длина 5 с конической платформой	3,35	4,00	-	5,00	-	-	0,31
P55C-4,6	Коннектор малый,	3,35	4,00	-	6,00	-	-	0,37

	диаметр 4, длина 6 с конической платформой							
P55C-4,7	Коннектор малый, диаметр 4, длина 7 с конической платформой	3,35	4,00	-	7,00	-	-	0,44
P55C-4,8	Коннектор малый, диаметр 4, длина 8 с конической платформой	3,35	4,00	-	8,00	-	-	0,50

10.11 Винты

Винты предназначены для крепления различных ортопедических элементов друг к другу, например, абатмента к имплантату. Как правило, поставляются вместе с ортопедическим элементом или отдельно.

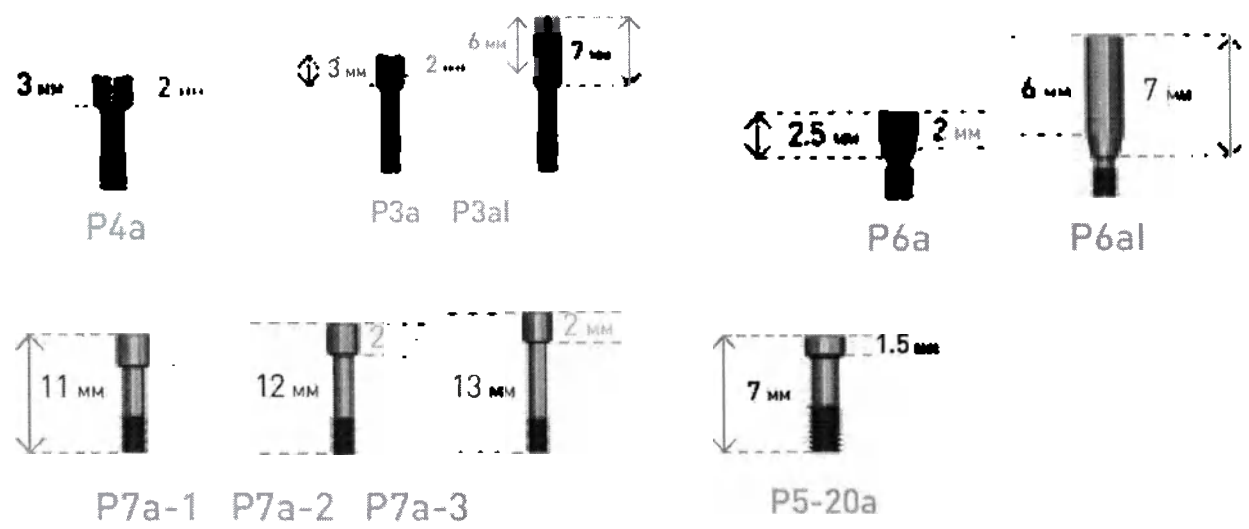

Номер по каталогу	Описание	Диаметр, D (мм)	Диаметр, D1 (мм)	Угол, α (°)	Длина L (мм)	Длина LS (мм)	Длина LS1 (мм)	Вес (г)
P6a	Винт для P6	-	-	-	-	-	-	0,03
P6al	Винт для P6- длинный	-	-	-	-	-	-	0,22
P6Ha	Винт	-	-	-	-	-	-	0,14
P5-20a	Винт для абатмента	-	-	-	-	-	-	0,04
P7a-1	Винт	-	-	-	-	-	-	0,10
P7a-2	Винт	-	-	-	-	-	-	0,11
P7a-3	Винт	-	-	-	-	-	-	0,12
P12a	Винт для P12	-	-	-	-	-	-	0,04
P12ca	Винт для P12C	-	-	-	-	-	-	0,03
P14a	Винт	-	-	-	-	-	-	0,03
P14e	Винт	-	-	-	-	-	-	0,03
D2a	Винт для трансфера - короткий	-	-	-	7,50	-	-	0,05
D2a-3	Винт для трансфера - короткий	-	-	-	8,00	-	-	0,04
D2al	Винт для трансфера - длинный	-	-	-	15,50	-	-	0,08
D2al-3	Винт для трансфера - длинный	-	-	-	15,50	-	-	0,07
D2-P14al	Винт для трансфера - длинный	-	-	-	15,50	-	-	0,08
D2-P14ca	Винт для P12C	-	-	-	7,50	-	-	0,05

10.12 Манжеты

P6H-b Манжета пластиковая без шестигранника		P6H-bT Манжета титановая без шестигранника	
P6H-bH Манжета пластиковая с шестигранником		P6H-bTH Манжета титановая с шестигранником	
P14b Манжета пластиковая для углового адаптера		P14-bT Манжета титановая для углового адаптера	
P14-bG Манжета золотая для углового адаптера			
P24b Манжета пластиковая для одноэтапного углового адаптера		P24 - bT Манжета титановая для одноэтапного углового адаптера	

Номер по каталогу	Описание	Диаметр, D (мм)	Диаметр, D1 (мм)	Угол, α (°)	Длина L (мм)	Длина LS (мм)	Длина LS1 (мм)	Вес (г)
P6H-b	Манжета пластиковая без шестигранника	-	-	-	-	-	-	0,14
P6H-bH	Манжета пластиковая с шестигранником	-	-	-	-	-	-	0,13
P6H-bT	Манжета титановая без шестигранника	-	-	-	-	-	-	0,17
P6H-bTH	Манжета титановая с шестигранником	-	-	-	-	-	-	0,17
P7b	Манжета пластиковая без шестигранника	-	-	-	-	-	-	0,10
P7b-H	Манжета пластиковая с шестигранником	-	-	-	-	-	-	0,09
P14-b	Манжета пластиковая для углового адаптера	-	-	-	-	-	-	0,19
P14-bG	Манжета золотая для углового адаптера	-	-	-	-	-	-	0,23
P14-bH	Манжета пластиковая	-	-	-	-	-	-	0,19

	для углового адаптера с шестигранником							
P14-bT	Манжета титановая для углового адаптера	-	-	-	-	-	-	0,29
P15a-1	Манжета пластиковая твердая	-	-	-	-	-	-	0,04
P15a-2	Манжета пластиковая стандартная	-	-	-	-	-	-	0,04
P15a-3	Манжета пластиковая мягкая	-	-	-	-	-	-	0,04
P24-b	Пластиковая манжета для одноэтапного углового адаптера	-	-	-	-	-	-	0,13
P24-bT	Титановая манжета для одноэтапного углового адаптера	-	-	-	-	-	-	0,19
PK-P2-3	Манжета пластиковая коническая без шестигранника (синяя)	3	5,35	-	8,40	-	-	0,09
PK-P2-3.75	Манжета пластиковая коническая без шестигранника (синяя)	3,5	5,35	-	8,40	-	-	0,02
PK-P2H-3	Манжета пластиковая коническая с шестигранником (красная)	3	5,35	-	8,40	-	-	0,09
PK-P2H-3.75	Манжета пластиковая коническая с шестигранником (красная)	3,5	5,35	-	8,40	-	-	0,09

10.13 Основание

10.13.1 Основание дл углового адаптера

P14base-17 Основание для P14, 17-1		
	P14base, 17-1	P14base, 17-3
P14base-30 Основание для P14, 30-1		
	P14base, 30-1	P14base, 30-3

Номер по каталогу	Описание	Диаметр, D (мм)	Диаметр, D1 (мм)	Угол, α (°)	Длина L (мм)	Длина LS (мм)	Длина LS1 (мм)	Вес (г)
P14base,17-1	Основание для P14,17-1	3,5	4,50	17	-	1,35	###	0,16
P14base,17-3	Основание для P14,17-3	3,5	4,50	17	-	2,90	###	0,22
P14base,30-1	Основание для P14,30-1	3,5	4,50	30	-	1,20	###	0,17
P14base,30-3	Основание для P14,30-3	3,5	4,50	30	-	2,75	###	0,23

P14Cbase-3,17-1	Основание для P14,17-1 с конической платформой	2,8	4,50	17	-	1,00	###	0,16
P14Cbase-3,17-3	Основание для P14,17-3 с конической платформой	2,8	4,50	17	•	3,00	###	0,21
P14Cbase-3,30-1	Основание для P14,30-1 с конической платформой	2,8	4,50	30	-	1,00	###	0,17
P14Cbase-3,30-3	Основание для P14,30-3 с конической платформой	2,8	4,50	30	-	3,00	###	0,22
P14Cbase-4,17-1	Основание для P14,17-1 с конической платформой	3,35	4,50	17	-	1,00	###	0,18
P14Cbase-4,17-3	Основание для P14,17-3 с конической платформой	3,35	4,50	17	-	3,00	###	0,23
P14Cbase-4,30-1	Основание для P14,30-1 с конической платформой	3,35	4,50	30	•	1,00	###	0,19
P14Cbase-4,30-3	Основание для P14,30-3 с конической платформой	3,35	4,50	30	-	3,00	###	0,24

10.14 Ортопедический набор РК



РК-D1
Аналог
имплантата

РК-D2
Трансфер
пластиковый

РК-P0
Формирователь
десны


РК-P2
Манжета
пластиковая
коническая без
шестигранника

РК-P2H
Манжета
пластиковая
коническая

РК-P3
Абатмент
анатомический
антиротационный

Ортопедический набор Prosthetic Kit предлагает стоматологам комплексное решение многих проблем в одной маленькой упаковке. Это превосходное ортопедическое решение для техники снятия оттиска с помощью трансфера, как для одиночной коронки, так и для мостовидных протезов. Этот набор позволяет стоматологу сделать оттиск методом закрытой ложки со всеми преимуществами метода открытой ложки. Ортопедический набор Prosthetic Kit от компании AB Dental упрощает процесс протезирования настолько это возможно, сокращая до минимума количество применяющихся приспособлений и предоставляя стоматологу полный профессиональный набор инструментов, для которых не нужны запасные детали.

Поставляется в 4-х конфигурациях по высоте (1-4) с двумя видами платформ: стандартной — 3.75мм и узкой — 3мм. В упаковке продаётся по 10 наборов.

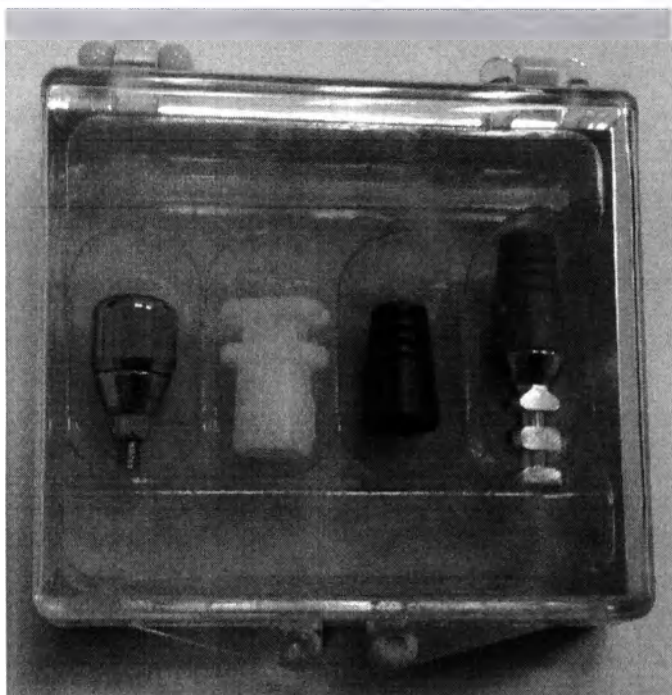

Состав наборов:

10.14.1 Ортопедический набор РК-3.75,1 (Prosthetic Kit):

1. Формирователь десны (Healing Cap), РК-P0-3.75;
2. Манжета пластиковая коническая без шестигранника (синяя) (Plastic Conical Sleeve without Hex (Blue)), РК-P2-3.75;
3. Манжета пластиковая коническая с шестигранником (красная) (Plastic Conical Sleeve with Hex (Red)), РК-P2H-3.75;
4. Абатмент анатомический антиротационный (Anatomic Anti - rotation Abutment), РК-P3-3.75,1;
5. Аналог имплантата (Implant Analog), РК-D1-3.75;
6. Трансфер пластиковый (Plastic Transfer), РК-D2-3.75.

10.14.2 Ортопедический набор РК-3.75,2 (Prosthetic Kit):

1. Формирователь десны (Healing Cap), РК-P0-3.75;
2. Манжета пластиковая коническая без шестигранника (синяя) (Plastic Conical Sleeve without Hex (Blue)), РК-P2-3.75;
3. Манжета пластиковая коническая с шестигранником (красная) (Plastic Conical Sleeve with Hex (Red)), РК-P2H-3.75;
4. Абатмент анатомический антиротационный (Anatomic Anti - rotation Abutment), РК-P3-3.75,2;
5. Аналог имплантата (Implant Analog), РК-D1-3.75;
6. Трансфер пластиковый (Plastic Transfer), РК-D2-3.75.

10.14.3 Ортопедический набор РК-3.75,3 (Prosthetic Kit):

1. Формирователь десны (Healing Cap), РК-P0-3.75;
2. Манжета пластиковая коническая без шестигранника (синяя) (Plastic Conical Sleeve without Hex (Blue)), РК-P2-3.75;
3. Манжета пластиковая коническая с шестигранником (красная) (Plastic Conical Sleeve with Hex (Red)), РК-P2H-3.75;
4. Абатмент анатомический антиротационный (Anatomic Anti - rotation Abutment), РК-P3-3.75,3;

5. Аналог имплантата (Implant Analog), РК-D1-3.75;
6. Трансфер пластиковый (Plastic Transfer), РК-D2-3.75.

10.14.4 Ортопедический набор РК-3.75,4 (Prosthetic Kit):

1. Формирователь десны (Healing Cap), РК-P0-3.75;
2. Манжета пластиковая коническая без шестигранника (синяя) (Plastic Conical Sleeve without Hex (Blue)), РК-P2-3.75;
3. Манжета пластиковая коническая с шестигранником (красная) (Plastic Conical Sleeve with Hex (Red)), РК-P2Н-3.75;
4. Абатмент анатомический антиротационный (Anatomic Anti - rotation Abutment), РК-P3-3.75,4;
5. Аналог имплантата (Implant Analog), РК-D1-3.75;
6. Трансфер пластиковый (Plastic Transfer), РК-D2-3.75.

10.14.5 Ортопедический набор РК-3,1 (Prosthetic Kit):

1. Формирователь десны (Healing Cap), РК-P0-3;
2. Манжета пластиковая коническая без шестигранника (синяя) (Plastic Conical Sleeve without Hex (Blue)), РК-P2-3;
3. Манжета пластиковая коническая с шестигранником (красная) (Plastic Conical Sleeve with Hex (Red)), РК-P2Н-3;
4. Абатмент анатомический антиротационный (Anatomic Anti - rotation Abutment), РК-P3-3,1;
5. Аналог имплантата (Implant Analog), РК-D1-3;
6. Трансфер пластиковый (Plastic Transfer), РК-D2-3.

10.14.6 Ортопедический набор РК-3,2 (Prosthetic Kit):

1. Формирователь десны (Healing Cap), РК-P0-3;
2. Манжета пластиковая коническая без шестигранника (синяя) (Plastic Conical Sleeve without Hex (Blue)), РК-P2-3;
3. Манжета пластиковая коническая с шестигранником (красная) (Plastic Conical Sleeve with Hex (Red)), РК-P2Н-3;
4. Абатмент анатомический антиротационный (Anatomic Anti - rotation Abutment), РК-P3-3,2;
5. Аналог имплантата (Implant Analog), РК-D1-3;
6. Трансфер пластиковый (Plastic Transfer), РК-D2-3.

10.14.7 Ортопедический набор РК-3,3 (Prosthetic Kit):

1. Формирователь десны (Healing Cap), РК-P0-3;
2. Манжета пластиковая коническая без шестигранника (синяя) (Plastic Conical Sleeve without Hex (Blue)), РК-P2-3;
3. Манжета пластиковая коническая с шестигранником (красная) (Plastic Conical Sleeve with Hex (Red)), РК-P2Н-3;
4. Абатмент анатомический антиротационный (Anatomic Anti - rotation Abutment), РК-P3-3,3;
5. Аналог имплантата (Implant Analog), РК-D1-3;
6. Трансфер пластиковый (Plastic Transfer), РК-D2-3.

10.14.8 Ортопедический набор РК-3,4 (Prosthetic Kit):

1. Формирователь десны (Healing Cap), РК-P0-3;
2. Манжета пластиковая коническая без шестигранника (синяя) (Plastic Conical Sleeve without Hex (Blue)), РК-P2-3;
3. Манжета пластиковая коническая с шестигранником (красная) (Plastic Conical Sleeve with Hex (Red)), РК-P2Н-3;

4. Абатмент анатомический антиротационный (Anatomic Anti - rotation Abutment), РК-РЗ-3,4;
5. Аналог имплантата (Implant Analog), РК-D1-3;
6. Трансфер пластиковый (Plastic Transfer), РК-D2-3.

Номер по каталогу	Описание	Диаметр, D (мм)	Диаметр, D1 (мм)	Угол, α (°)	Длина L (мм)	Длина LS (мм)	Длина LS1 (мм)	Вес (г)
РК-3,1	Ортопедический набор	-	-	-	-	-	-	8,77
РК-3,2	Ортопедический набор	-	-	-	-	-	-	8,83
РК-3,3	Ортопедический набор	-	-	-	-	-	-	8,88
РК-3,4	Ортопедический набор	-	-	-	-	-	-	8,94
РК-3.75,1	Ортопедический набор	-	-	-	-	-	-	9,04
РК-3.75,2	Ортопедический набор	-	-	-	-	-	-	9,10
РК-3.75,3	Ортопедический набор	-	-	-	-	-	-	9,13
РК-3.75,4	Ортопедический набор	-	-	-	-	-	-	9,17

Инструкция по применению

Формирование зубного протеза.

Существуют различные техники протезирования. Одноэтапная техника – десна окружает формирователь десны сразу после установки имплантата. Формирователь десны направляет заживление десны по своей форме. Десна уже сформирована.

Двухэтапная техника – десна полностью покрывает имплантат с винтом заглушкой, что дает возможность заживать кости и интегрироваться имплантату без влияния факторов полости рта. При этом дефект десны ушивается. После заживления проводится разрез слизистой-надкостного лоскута, удаляется винт-заглушка и операционное поле тщательно промывается стерильным раствором. Затем подбирается формирователь десны нужной высоты - это зависит от толщины мягких тканей и профиля конечной реставрации.

После установки и приживления имплантата можно приступать к формированию зубного протеза. Для его опоры используются различного вида абатменты и прочие сопутствующие принадлежности.

Установка ортопедических элементов

Р0 - титановый формирователь десны

Вкручивается в шестигранное отверстие в верхней части имплантата. В верхней части формирователя десны имеется шестигранное отверстие под соответствующую отвертку T1 или T2, с помощью которого формирователь прикрепляется к имплантату, а в дальнейшем отсоединяется от него.

Освободите имплантат из под тканей десны. Удалите винт покрытия из имплантата, ввинтите на его место формирователь десны, закрепив его на имплантате. Подберите соответствующий формирователь в соответствии с высотой и шириной десны. При необходимости после установки формирователя накладываются швы. По окончании периода заживления формирователь десны снимается, чтобы установить абатмент.

Р1/Р1Н - абатмент без шестигранника

Прямой абатмент без шестигранника в нижней части. В верхней части абатмента имеется отверстие под соответствующую отвертку T1 или T2, с помощью которой абатмент прикрепляется к имплантату, а затем отсоединяется от него. Измерения производятся при помощи трансфера, аналога и создания модели. При необходимости абатмент можно заточить,

используя нанесенную на него линию высоты. После выздоровления десны и приобретения нужной формы абатмент без шестигранника вкручивается в имплантат при помощи динамометрического ключа с моментом кручения до 30 Нсм. Этот резьбовой абатмент следует использовать при наличии как минимум двух прилежащих имплантатов. После соединения двух абатментов постоянным штифтом на них может быть установлен мост или коронка в зависимости от модели.

P2 - пластиковая гильза

Используется для отливки. При необходимости может быть разрезана и прикреплена к другой пластиковой гильзе. Гильза с шестигранником может использоваться в качестве одиночного имплантата. Выбранная пластиковая гильза и винт крепятся к модели в лаборатории. Затем гильзы удаляются из модели, и винты, после чего гильзы используются для изготовления гипсовой формы. Коронки подгоняются к металлическому каркасу, после чего осуществляется окончательная сборка во рту у пациента на имплантате с помощью динамометрического ключа.

P3/P3Z/P3S/P3SZ - прямой антиротационный абатмент/анатомический антиротационный абатмент

Прямой абатмент с шестигранной полостью в нижней части. Шестигранная головка присоединенного винта соответствует шестигранной отвертке (T1/T2). Когда требуется с его помощью абатмент устанавливается и снимается с имплантата. При необходимости абатмент можно заточить используя нанесенные на него линии высоты. Выберите нужный размер и высоту абатмента. Установите одиночный абатмент на одиночный имплантат или несколько абатментов на несколько имплантатов. Несколько абатментов могут быть соединены попарно в лаборатории. После подгонки коронки осуществляется окончательная сборка во рту пациента на имплантате с помощью динамометрического ключа.

P4/P4Z/P4S/P4SZ - угловой антиротационный абатмент/анатомический антиротационный абатмент

Угловой абатмент с шестигранной полостью в нижней части. Шестигранная головка присоединенного винта соответствует шестигранной отвертке (T1/T2). Когда требуется с его помощью абатмент устанавливается и снимается с имплантата. При необходимости абатмент можно заточить используя нанесенные на него линии высоты. Вставьте абатмент в имплантат в нужном положении. Ввинтите и закрепите удерживающий винт с помощью динамометрического ключа. Угловой абатмент состоящий из трех частей P4/3 следует пометить на наружной стороне основания и верхней части во избежание ошибок при сборке.

P5 - шаровидный аттачмент

Прямой абатмент с резьбой и с шаровидной верхней частью без шестигранника внизу. Внутри шарика имеется шестигранная полость под шестигранную отвертку T1/T2 для крепления абатмента к имплантату и его отсоединения. Высоту шаровидного аттачмента следует выбирать соответственно потребностям при реабилитации. Металлический колпачок P5a устанавливается на съемные зубные протезы. Выбирается нужная степень жесткости силиконового колпачка (P5b) и силиконовый колпачок вставляется в металлический. При установке съемных зубных протезов на шаровидный аттачмент необходимо нажать на протез, пока вы не услышите щелчок. Силиконовый колпачок зафиксирован обхватив шарик. Закрепите абатмент динамометрическим ключом.

P5/20 - угловой шаровидный аттачмент

Инструкцию такие же как и для прямого аттачмента. Верхнюю поверхность основания можно вращать, меняя нужным образом высоту шарика и угол.

P6H - эстетический абатмент

Титатый абатмент для моста с резьбой.Подходит для одного или нескольких имплантатов с мостом, который будет установлен в будущем. Не предназначен для использования с одиночным имплантатом.

Выбите нужный диаметр и высоту абатмента. Закрепите абатменты на аналоги в модели. Обрежьте как потребуется, пластиковые гильзы и соедините их между собой. Отлейте металлический мост, поместите на него коронки с помощью винтов имплантатов, которые установлены во рту. Чтобы удалить абатмент необходимо полностью снять удерживающий винт и извлечь абатмент вручную.

Р7 - антиротационный эстетический абатмент

Инструкции те же что и для Р6Н. Этот абатмент можно использовать с одиночным имплантатом. Лучше подходит для передних зубов.

Р9 - составной абатмент с шестигранником

Имеет металлическое основание на которое помещена пластиковая гильза. Металлическое основание изготовлено из титана или золота. Абатменты из титана могут использоваться для отливки с любыми видами металлов, однако лучшие результаты достигаются с полудрагоценными металлами. Абатменты золотые могут использоваться только для отливки с драгоценными видами металлов.

Для недрагоценных металлов следует задать температуру отливки 900 °С. Для драгоценных - 850 °С.

После удаления литого абатмента из модели следует выполнить очистку паром. Смажьте горячим воском металлическое основание с шестигранником, а затем выполните пескоструйную обработку абатмента стеклянными песчинками под давлением не более 3 бар. Вытрите воск. Абатмент готов к применению.

Установка абатментов

Абатмент крепится в имплантате винтом. После удаления винта абатмент останется на месте, даже если он находится в верхней челюсти.

При получении оттиска для лаборатории выполните следующие действия.

- с помощью ручной шестигранной отвертки Т2 удалите винт из абатмента
- отложите винт в сторону. Полностью ввинтите извлекающий винт Т4 в абатмент на всю длину до упора
- дополнительно вращение Т4 позволит аккуратно извлечь абатмент.

Р12 - абатмент с плоским соединением

Для получения оттиска присоедините трансфер для оттисковой ложки с плоским соединением (D2-Р12) к имплантату с двойной платформой. Закрепите постоянный абатмент с плоским соединением на аналогах, используя лабораторную модель, после чего выполните отливку моста, используя пластиковую гильзу Р12. Соберите мост на имплантатах во рту пациента и затяните динамометрическим ключом. Для выполнения немедленной нагрузки во рту следует установить временный абатмент с плоским соединением Р12Т и прикрепить твердеющим композитным клеем к заранее подготовленному полному мосту. Вся конструкция может быть укорочена как потребуется.

Р14 - угловой адаптер

Установите адаптер в нужное положение в имплантате, используя пластмассовый держатель (в упаковке адаптер прикреплен к держателю). Ввинтите и зафиксируйте удерживающий винт динамометрическим ключом. Отделите пластмассовый держатель, повернув его против часовой стрелки. Ввинтите конус в адаптер и закрепите его. Извлеките удерживающий винт металлического держателя с помощью инструмента Т2. Для временного моста прикрутите титановую гильзу к конусу.

P15 - временный абатмент для немедленной нагрузки

Перед имплантацией подготовьте временный мост. После имплантации выберите соответствующий абатмент. Ввинтите абатмент так же, как ввинчивали формирователь десны и оденьте сверху пластиковый колпачок до щелчка. Накройте пластиковые колпачки во временном мосте и обработайте края. Установите мост на абатменты и слегка надавите на него до щелчка.

P16 - прямой адаптер

Инструкция та же, что и для абатмента P6/P6H.

Используемые материалы

1 Титановый сплав Ti-6Al-4V ELI Grade 5 производства «Dynamet», США, выполненный в соответствии со стандартом ASTM-F136-02, а также ISO 5832-2:1996.

Из титанового сплава изготовлены: все формирователи десны, абатменты без шестигранника (P1-3.75,9, P1-3.75,13, P1-3.75,15, P1-4.5,9, P1H-3.75,9, P1H-3.75,13, P1H-3.75,15), все антиротационные абатменты, угловые абатменты, эстетические абатменты, временные абатменты, шаровидные аттачменты, винты для абатментов (P3a-L, P3a-S, P4a, P6Ha, P6a, P6a-L, P7a-1, P7a-2, P7a-3, P12a, P12Ca), колпачок металлический (P5a), защитный диск (P5pd), все титановые манжеты, адаптеры, Локаторы, коннекторы, аналоги, аналоги имплантатов, трансферы

Химический состав титанового сплава:

Химические элементы	Al	V	C	O	N	H	Ir	Ti
Макс. % от массы	5.5-6.5	3.5-4.5	0.08	0.13	0.05	0.013	0.25	остаток

Механические свойства титанового сплава:

	Предел прочности на разрыв (Rm), МПа	Максимальное напряжение не пропорционального удлинения (Rp), МПа	Относительное удлинение на разрыв (A), Мин. %	Диаметр сердечника для теста на изгиб, мм
Лист и штрипс	860	780	8	10-t (t-толщина листа)
Прут макс. диаметр 75 мм)	860	780	10	-

2. Материал под торговой маркой Delrin, производства «Ensinger-Hyde», Канада. Представляет собой полиформальдегид (гомополимер и сополимер формальдегида).

Из этого материала изготовлены: все пластиковые манжеты, пластиковые трансферы.

3 Полиэфирэфиркетон (PEEK). Торговая марка материала PEEK-CLASSIX™ производства «Invibio Ltd.», Великобритания.

Из материала PEEK изготовлены все временные PEEK абатменты.

Характеристика материала PEEK

Цвет	Относительная плотность, г/см ³	Прочность на разрыв, МПа	Температура плавления, °C
Белый	1,38	95	343

4 Материал Zirconia, производства «US Research Nanomaterials, Inc.», США.

Представляет собой нанопорошок оксида циркония стабилизированного оксидом иттрия (ZrO₂ + Y₂O₃).

Химический состав:

оксид циркония $94,8 \pm 0,2$ %;

оксид иттрия $5,2 \pm 0,2$ %;

Из материала Zirconia изготовлены все циркониевые абатменты.

5 Силикон

Из силикона изготовлены: все силиконовые колпачки, защитный диск (P5d).

6 Все золотые абатменты изготовлены из титанового сплава, а основание выполнено из золота.

Стерильность

Все изделия поставляются не стерильными в индивидуальной потребительской упаковке, промаркированной надписью «Не стерильно». Изделия, предназначенные для интраорального использования предварительно должны пройти предстерилизационную очистку и стерилизацию.

Инструкция по предстерилизационной очистке и стерилизации

Предстерилизационная очистка:

Изделия рекомендуется погрузить в раствор с моющим средством, утвержденным для применения в конкретном лечебном учреждении, промыть дистиллированной водой и тщательно высушить.

Стерилизация.

Изделия должны стерилизоваться паром в автоклаве при температуре 132° - 137° С в течение 15 минут в отдельном пакете.

Хранение.

Стерилизованные потребителем изделия храните в стерилизационных пакетах в чистом, сухом, обеспыленном помещении при температуре от $+5$ до $+40^{\circ}$ С.

Срок сохранения стерильности зависит от типа используемой упаковки для финишной стерилизации.

Условия эксплуатации

Температура эксплуатации: от $+10^{\circ}$ С до $+40^{\circ}$ С.

Относительная влажность воздуха не более 90%.

Атмосферное давление: от 70 до 106 кПа.

МИ должно использоваться только специально обученным персоналом в условиях хирургического кабинета, отвечающего требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

Условия транспортировки и хранения.

При хранении необходимо соблюдать следующие условия:

- Хранить в заводской упаковке в крытых, отапливаемых, вентилируемых складах и хранилищах.

- Хранить в сухом месте. Относительная влажность не более 90% при $+25^{\circ}$ С, без образования конденсата.

- Температура хранения: от $+5^{\circ}$ С до $+40^{\circ}$ С.

- Атмосферное давление: от 70 до 106 кПа.

- Хранить в защищенном от прямых солнечных лучей месте.

- Не допускать механических ударов и повреждений упаковки.


- Стерилизованные потребителем изделия хранить в автоклавируемой упаковке в чистом, сухом, обеспыленном помещении при температуре от +5 до +40 °С.

При транспортировании необходимо соблюдать следующие условия:

- Изделия должны отгружаться и перевозиться в оригинальной транспортной упаковке.
- Изделия транспортируют всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.
- Температура транспортирования: от -10 °С до + 40° С.
- Относительная влажность воздуха не более 90%.
- Атмосферное давление: от 70 до 106 кПа.

Маркировка и упаковка

Дизайн этикетки ортопедических элементов

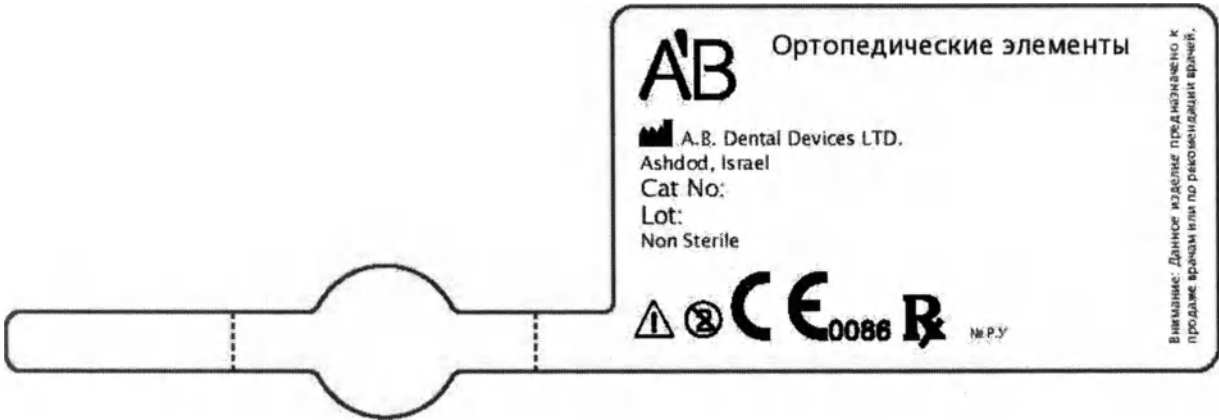


На этикетке ортопедических элементов нанесена следующая маркировка: наименование, товарный знак и страна изготовителя; наименование изделия; каталожный номер изделия; номер партии LOT; знаки: CE, «Перед применением обратитесь к сопроводительной документации», «Только для однократного применения», надпись «Не стерильно», надписи, предупреждающие о применении только по назначению врача.

Расшифровка знаков маркировки


	Производитель
	Соответствие Директивам и стандартам ЕС
	Только для однократного применения
	Номер партии
	Каталожный номер
	Перед применением изучите сопроводительную документацию

Упаковка ортопедических элементов
Индивидуальная упаковка

1. Изделие герметично упаковано в двойную колбу с крышкой из прозрачного пластика с наклеенной на ней этикеткой, указанная выше.

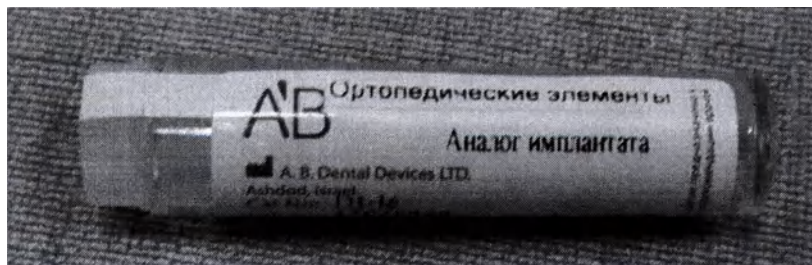

2. Наборы изделий упакованы в пластиковый контейнер для хранения изделий с углублениями соответствующими профилю каждого изделия из набора. Затем контейнер с набором вместе с инструкцией помещен в картонную коробку с наклеенной на ней этикеткой, указанная выше.

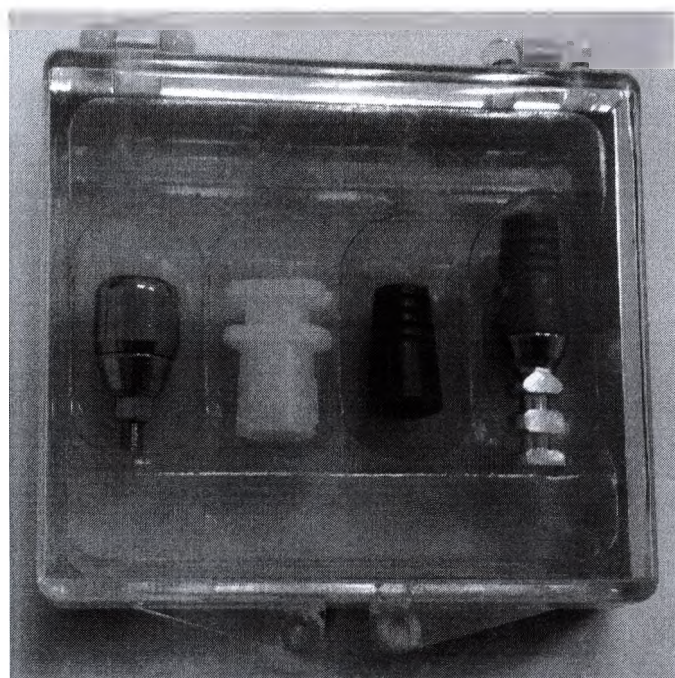

Групповая упаковка

Изделия в индивидуальной упаковке-колбе в количестве 10 штук вместе с инструкцией уложены в групповую упаковку - полиэтиленовый пакет с застежкой Зип, на которую наклеена этикетка, указанная выше.



Гарантийные обязательства

Производитель гарантирует качество МИ и соответствие изделий требованиям заявленных нормативных документов при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

Изготовитель не несет ответственности за побочные эффекты, возникшие в результате неправильной имплантации или эксплуатации изделий.

Компания A.B. Dental Devices гарантирует в течение 15 лет после продажи заменить любой имплантат или реставрационный компонент, носящий имя компании A.B. Dental Devices. Эта гарантия не покрывает хирургические приспособления или инструменты, используемые с имплантатом. Для того, чтобы воспользоваться данной гарантией, имплантаты компании A.B. Dental Devices должны быть имплантированы согласно протоколам и процедурам, описанным инструкции по применению. Врач должен пройти обучение по имплантационной хирургии. Компания A.B. Dental Devices не может нести ответственность за любые повреждения тела или материала. Эта гарантия обеспечивает, что при необходимости поставщик заменит поврежденный имплантат или покроет затраты на покупку замены. Важно, чтобы врач-имплантолог записал номер партии установленного имплантата, чтобы при возникновении гарантийного случая произвести замену. Затем необходимо предоставить в компанию A.B. Dental Devices копию инвойса, сомнительные изделия (стерильные или очищенные), результаты рентгена до извлечения, на котором видна поломка, рентген деталей в полости рта, номера партий деталей и отчет об инциденте.

Компания A.B. Dental Devices оставляет за собой право вносить изменения, отклонения или менять данную гарантию в любое время.

Срок службы (годности)

Все представленные изделия являются изделиями однократного применения. Повторное применение не допустимо. Гарантийный срок эксплуатации отсутствует.

Утилизация – порядок осуществления

По окончании срока службы изделия, его необходимо утилизировать в соответствии с национальным законодательством и соответствующими действующими нормативами.

Изделия, контактирующие с биологическими жидкостями организма, после использования, утилизируются как отходы стандартным способом согласно СанПиН.2.1.7.2790-2010.

Обязанность по утилизации не распространяется на завод-изготовитель.

Результаты анализа риска

Анализ рисков продукта был проведен на основе EN ISO 14971.

Подтверждающие документы:

Файл менеджмента риска изготовителя № 7.3.2.01.00 от 29.07.2012 г.

Файл анализа рисков изготовителя № 7.3.2.00.01 от 26.06.2013 г.

Контактная информация:

Производитель МИ

«A.B. Dental Devices Ltd.», Израиль

Адрес: 19 Hayahalomim st., Ashdod, Israel

Телефон: +972-8-8531388

Факс: +972-8522562

Сайт: <http://www.ab-dent.com/>

Представитель в ЕС:

«CEpartner4U B.V.», Нидерланды

Esdoornlaan 13, 3951 DB MAARN, The Netherlands

Tel: +31 343 442 524

Fax: +31 343 442 162

Уполномоченный представитель производителя:

Общество с ограниченной ответственностью «Имплант Сервис»

426000, Россия, Удмуртская республика, г.Ижевск, ул.К Маркса, 360

Телефон: +7(3412) 904-501

i-mail: izhdent@mail.ru

/ЛОГОТИП/

Производитель:

А.Б. Дентал Девайсис Лтд. (A.B. Dental Devices Ltd.)

Адрес: ул. Хаяхаломим, 19, Ашдод 7761117 Израиль

тел.: +972.8.8531388

факс: +972.8.8522562

Веб-страница: www.ab-dent.com

Перевод штампа к инструкции по применению медицинского изделия

Штамп:

А.Б. Дентал Девайсис Лтд

/текст инструкции выполнен на русском языке/

Переводчик

Анган Т.

Город Москва.

Одиннадцатого октября две тысячи шестнадцатого года.

Я, Давыдова Галина Александровна, нотариус города Москвы, свидетельствую подлинность подписи, сделанной переводчиком Анган Татьяной в моем присутствии. Личность её установлена.

Зарегистрировано в реестре за № *1-7406*

Взыскано по тарифу: 100 руб. 00 коп.

Нотариус:

Давыдова



Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью 70 лист (-а, -ов)

Нотариус:

