



## Инструкция по применению

Бахилы медицинские одноразовые из полиэтилена низкого давления  
ТУ 32.50.50-001-33186646-2017

Нестерильно.

**Назначение изделия:** Бахилы надеваются на обувь и обеспечивают соблюдение требований гигиены как средство предотвращения загрязнения помещения и перекрестного заражения между обувью и окружающей средой при большом потоке посетителей.

**Область применения:** медицинские клиники и лечебно-профилактические учреждения.

**Противопоказания к применению:** отсутствуют.

**Комплект поставки:** указан на этикетке.

**Общие сведения:** водоупорность материала - водонепроницаем.

**Основные размеры:** для одинарных бахил: высота бахил  $140 \pm 10$  мм, длина бахил  $390 \pm 10$  мм; для бахил удлинённых: высота бахил  $140 \pm 10$  мм, длина бахил  $410 \pm 10$  мм; для бахил укороченных: высота бахил  $110 \pm 10$  мм, длина бахил  $390 \pm 10$  мм; для бахил с двойной подошвой: высота бахил  $140 \pm 10$  мм, длина бахил  $390 \pm 10$  мм; для бахил двойных: высота бахил  $140 \pm 10$  мм, длина бахил  $390 \pm 10$  мм. Масса одной пары бахил, от  $(1,5 \pm 0,5)$  г до  $(15 \pm 0,5)$  г

Изделие представляет собой бахилу изготовленную из полиэтиленовой плёнки низкого давления по ТУ 2245-001-39455604-2012 с резинкой, закреплённой сварным швом.

**Упаковка:** При индивидуальной упаковке одна пара бахил уложена в пакет с замком «зип-лок», или в капсулу упаковочную ТУ 2297-001-0168493543-2016. Бахилы в индивидуальной упаковке укладываются в ящик, изготовленный из картона по ГОСТ 33781-2016. В ящик вложен вкладыш и инструкция по применению.

Индивидуальная упаковка бахил (пакет «зип-лок» или капсула упаковочная) из-за малых размеров не маркируется. Маркировка наносится на групповую упаковку.

**Примечание:** При реализации изделий в индивидуальной упаковке вкладыш с маркировкой реализующая сторона закрепляет на автомат или другое устройство для продажи бахил.

**Меры безопасности:** НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ПРИМЕНЯТЬ ПО ИСТЕЧЕНИИ СРОКА ХРАНЕНИЯ.

Бахилы предназначены ТОЛЬКО для одноразового использования.

Необходимо соблюдать условия хранения и срок хранения изделия, который указан на этикетке.

**Подготовка изделия к работе:** Изделие полностью готово к работе и дополнительной подготовки перед использованием не требуют.

**Способ применения:** Для применения каждая бахила надевается на обувь.

**Транспортирование** изделий, упакованных в транспортную тару, должно осуществляться всеми видами крытых транспортных средств с соблюдением предосторожностей, указанных на транспортной таре и в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте каждого вида.

Условия транспортирования в соответствии с ГОСТ 15150-69 группа 5 (при температуре  $50^{\circ}\text{C}$  - минус  $50^{\circ}\text{C}$ )

**Хранение** изделий у изготовителя и потребителя должно осуществляться в групповой таре либо в транспортной таре в соответствии с условиями хранения 2 по ГОСТ 15150-69 (при температуре  $40^{\circ}\text{C}$  - минус  $50^{\circ}\text{C}$ ) и должны быть защищены от солнечных лучей и атмосферных воздействий.

Срок хранения: 5 лет.

Гарантийный срок хранения: 3 года со дня изготовления.

**Ремонт и техническое обслуживание:** не подлежат

**Утилизация:** Использованные изделия складываются как отходы класса А, и утилизируются в установленном порядке в соответствии с требованием СанПиН 2.1.7.2790-2010

**Изготовитель:** ООО «ЭЛЕГРИН»

**Юридический адрес:** 196084, г Санкт-Петербург, ул Цветочная, д 2, литер В, помещение 28 Н

**Телефон:** 8-812-400-81-00



## Инструкция по применению

Бахилы медицинские одноразовые из полиэтилена высокого давления  
ТУ 32.50.50-001-33186646-2017  
Нестерильно.

**Назначение изделия:** Бахилы надеваются на обувь и обеспечивают соблюдение требований гигиены как средство предотвращения загрязнения помещения и перекрестного заражения между обувью и окружающей средой при большом потоке посетителей.

**Область применения:** медицинские клиники и лечебно-профилактические учреждения.

**Противопоказания к применению:** отсутствуют.

**Комплект поставки:** указан на этикетке.

**Общие сведения:** водоупорность материала-водонепроницаем.

**Основные размеры:** для одинарных бахил: высота бахил  $145 \pm 15$  мм, длина бахил  $400 \pm 20$  мм. Масса одной пары бахил:  $12 \pm 0,5$  г;  $18 \pm 0,5$  г.

Изделие представляет собой бахилу изготовленную из полиэтиленовой плёнки высокого давления по ТУ 22.21.30-005-33186646-2017 с резинкой, закреплённой сварным швом.

**Упаковка:** При индивидуальной упаковке одна пара бахил уложена в пакет с замком «зип-лок», или в капсулу упаковочную ТУ 2297-001-0168493543-2016. Бахилы в индивидуальной упаковке укладывается в ящик, изготовленный из картона по ГОСТ 33781-2016. В ящик вложен ярлык и инструкция по применению.

Индивидуальная упаковка бахил (пакет «зип-лок» или капсула упаковочная) из-за малых размеров не маркируется. Маркировка наносится на групповую упаковку.

**Примечание:** При реализации изделий в индивидуальной упаковке вкладыш с маркировкой реализующая сторона закрепляет на автомат или другое устройство для продажи бахил.

**Меры безопасности:** НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ПРИМЕНЯТЬ ПО ИСТЕЧЕНИИ СРОКА ХРАНЕНИЯ.

Бахилы предназначены ТОЛЬКО для одноразового использования.

Необходимо соблюдать условия хранения и срок хранения изделия, который указан на этикетке.

**Подготовка изделия к работе:** Изделие полностью готово к работе и дополнительной подготовки перед использованием не требуют.

**Способ применения:** Для применения каждая бахила надевается на обувь.

**Транспортирование** изделий, упакованных в транспортную тару, должно осуществляться всеми видами крытых транспортных средств с соблюдением предосторожностей, указанных на транспортной таре и в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте каждого вида.

Условия транспортирования в соответствии с ГОСТ 15150-69 группа 5 (при температуре  $50^{\circ}\text{C}$  -минус  $50^{\circ}\text{C}$ )

**Хранение** изделий у изготовителя и потребителя должно осуществляться в групповой таре либо в транспортной таре в соответствии с условиями хранения 2 по ГОСТ 15150-69 (при температуре  $40^{\circ}\text{C}$  -минус  $50^{\circ}\text{C}$ ) и должны быть защищены от солнечных лучей и атмосферных воздействий.

Срок хранения: 5 лет.

Гарантийный срок хранения: 3 года со дня изготовления.

**Ремонт и техническое обслуживание:** не подлежат

**Утилизация:** Использованные изделия складываются как отходы класса А, и утилизируются в установленном порядке в соответствии с требованием СанПиН 2.1.7.2790-2010

**Изготовитель:** ООО «ЭЛЕГРИН»

**Юридический адрес:** 196084, г Санкт-Петербург, ул Цветочная, д 2, литер В, помещение 28 Н

Телефон: 8-812-400-81-00



## Инструкция по применению



Бахилы медицинские одноразовые из нетканого материала

арт. \_\_\_\_\_

ТУ 32.50.50-001 -33186646-2017

Нестерильно

**Назначение изделия:** Бахилы надеваются на обувь и обеспечивают соблюдение требований гигиены как средство предотвращения загрязнения помещения и перекрестного заражения между обувью и окружающей средой при большом потоке посетителей.

**Область применения:** медицинские клиники и лечебно-профилактические учреждения.

**Противопоказания к применению:** отсутствуют.

**Комплект поставки:** указан на этикетке.

**Ограничения:** бахилы, изготовленные из нетканого материала должны применяться только при отсутствии влаги на поверхности пола.

**Общие сведения:** Изделие представляет собой бахилу, изготовленную из нетканого материала (100% полипропилен) поверхностной плотностью  $10 \pm 3$  г/м<sup>2</sup> или  $15 \pm 3$  г/м<sup>2</sup> с резинкой, закреплённой сварным швом.

**Основные размеры:** длина бахил – (370±10) мм, ширина развёртки - (210±20) мм, длина верхней части бахил – (160±20) мм, высота бахил – (105±10) мм, масса (2,5±0,5) г.

**Упаковка:** При индивидуальной упаковке одна пара бахил уложена в пакет с замком «зип-лок», или в капсулу упаковочную. Бахилы в индивидуальной упаковке укладываются в ящик, изготовленный из картона по ГОСТ 33781. В ящик вложен вкладыш и инструкция по применению. Индивидуальная упаковка бахил (пакет «зип-лок» или капсула упаковочная) из-за малых размеров не маркируется. Маркировка наносится на групповую упаковку.

**Примечание:** При реализации изделий в индивидуальной упаковке вкладыш с маркировкой реализующая сторона закрепляет на автомат или другое устройство для продажи бахил.

**Меры безопасности:**

**НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ПРИМЕНЯТЬ ПО ИСТЕЧЕНИИ СРОКА ХРАНЕНИЯ.**

Бахилы предназначены ТОЛЬКО для одноразового использования.

Необходимо соблюдать условия хранения и срок хранения изделия, который указан на этикетке.

**Подготовка изделия к работе:** Изделие полностью готово к работе и дополнительной подготовки перед использованием не требуют.

**Способ применения:** Для применения бахила надевается на обувь.

**Транспортирование** изделий, упакованных в транспортную тару, должно осуществляться всеми видами крытых транспортных средств с соблюдением предосторожностей, указанных на транспортной таре и в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте каждого вида. Условия транспортирования в соответствии с ГОСТ 15150-69 группа 5 (при температуре 50 °С - минус 50 °С)

**Хранение** изделий у изготовителя и потребителя должно осуществляться в групповой таре либо в транспортной таре в соответствии с условиями хранения 2 по ГОСТ 15150-69 (при температуре 40 °С - минус 50 °С) и должны быть защищены от солнечных лучей и атмосферных воздействий.

Срок хранения: 5 лет.

Гарантийный срок хранения: 3 года со дня изготовления.

**Ремонт и техническое обслуживание:** не подлежат

**Утилизация:** Использованные изделия складываются как отходы класса А, и утилизируются в установленном порядке в соответствии с требованием СанПиН 2.1.7.2790-2010

**Изготовитель:** ООО «ЭЛЕГРИН»

**Юридический адрес:** 196084, г Санкт-Петербург, ул. Цветочная, д 2, литер В, помещение 28 Н

**Телефон:** 8-812-400-81-00



## Инструкция по применению



Бахилы медицинские одноразовые из нетканого материала, ламинированные

Арт \_\_\_\_\_

ТУ 32.50.50-001 -33186646-2017

Нестерильно.

**Назначение изделия:** Бахилы надеваются на обувь и обеспечивают соблюдение требований гигиены как средство предотвращения загрязнения помещения и перекрестного заражения между обувью и окружающей средой при большом потоке посетителей.

**Область применения:** медицинские клиники и лечебно-профилактические учреждения.

**Противопоказания к применению:** отсутствуют.

**Комплект поставки:** указан на этикетке.

**Основные размеры:** высота бахил:  $160 \pm 10$  мм, длина бахил  $390 \pm 20$  мм, масса одной пары бахил от  $(11 \pm 0,5)$  г до  $(13 \pm 0,5)$  г.

Изделие представляет собой бахилу, изготовленную из нетканого материала (100% полипропилен) марки СМС по ТУ 8390-001-77056896-2008 с нанесением полиэтиленовой плёнки низкого давления по ТУ 2245-001-39455604-2012 с резинкой, закреплённой сварным швом.

Поверхностная плотность ламинированного нетканого материала должна быть:  
 $35 \pm 8$  г/м<sup>2</sup>,  $50 \pm 10$  г/м<sup>2</sup>

**Упаковка:** При индивидуальной упаковке одна пара бахил уложена в пакет с замком зип-лок, или в капсулу упаковочную ТУ 2297-001-0168493543-2016. Бахилы в индивидуальной упаковке укладываются в ящик, изготовленный из картона по ГОСТ 33781. В ящик вложен вкладыш и инструкция по применению.

Индивидуальная упаковка бахил (пакет "зип-лок" или капсула упаковочная из-за малых размеров не маркируется. Маркировка наносится на групповую упаковку.

**Примечание:** При реализации изделий в индивидуальной упаковке вкладыш с маркировкой реализующая сторона закрепляет на автомат или другое устройство для продажи бахил.

**Меры безопасности:** НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ПРИМЕНЯТЬ ПО ИСТЕЧЕНИИ СРОКА ХРАНЕНИЯ.

Бахилы предназначены ТОЛЬКО для одноразового использования.

Необходимо соблюдать условия хранения и срок хранения изделия, который указан на этикетке.

**Подготовка изделия к работе:** Изделие полностью готово к работе и дополнительной подготовки перед использованием не требуют.

**Способ применения:** Для применения каждая бахила надевается на обувь.

**Транспортирование** изделий, упакованных в транспортную тару, должно осуществляться всеми видами крытых транспортных средств с соблюдением предосторожностей, указанных на транспортной таре и в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте каждого вида. Условия транспортирования в соответствии с ГОСТ 15150-69 группа 5 (при температуре 50 °С - минус 50 °С)

**Хранение** изделий у изготовителя и потребителя должно осуществляться в групповой таре либо в транспортной таре в соответствии с условиями хранения 2 по ГОСТ 15150-69 (при температуре 40 °С - минус 50 °С) и должны быть защищены от солнечных лучей и атмосферных воздействий.

Срок хранения: 5 лет.

Гарантийный срок хранения: 3 года со дня изготовления.

**Ремонт и техническое обслуживание:** не подлежат

**Утилизация:** Использованные изделия складываются как отходы класса А, и утилизируются в установленном порядке в соответствии с требованием СанПиН 2.1.7.2790-2010

**Изготовитель:** ООО «ЭЛЕГРИН»

**Юридический адрес:** 196084, г Санкт-Петербург, ул Цветочная, д 2, литер В, помещение 28 Н

Телефон: 8-812-400-81-00

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

4 ( четыре ) листов.

Генеральный директор:  
ООО «Элегрин»



А.Н.Титяев