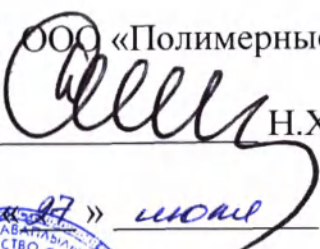


ОКПД2 32.50.50.190

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор

ООО «Полимерные изделия»

 Н.Х.Шакиров

2022г.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Штатив лабораторный полимерный для пробирок ШЛПП-40
по ТУ 9452-156-05579988-2006
3872.6.873.313-02 ИП
(Версия 2. Дата пересмотра: 07.2022 г.)

2022

1. Наименование медицинского изделия

Штатив лабораторный полимерный для пробирок ШЛПП-40 по ТУ 9452-156-05519988-2006

2. Производитель

Общество с ограниченной ответственностью «Полимерные изделия» (ООО «Полимерные изделия»).

Юридический адрес (адрес места производства): Россия, 420021, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Салиха Сайдашева, д.12.

Тел.: (843) 278-23-05, 278-22-77.

E-mail: info@polimizd.ru, www.polimizd.ru.

3. Назначение

Штатив предназначен для установки стеклянных пробирок с питательными средами, культурами бактерий и реактивами, в качестве вспомогательного средства в клинической лабораторной диагностике (in vitro).

Вид климатического исполнения – УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150.

4. Область применения

Клиническая лабораторная диагностика, медицинские исследования в лечебно-профилактических учреждениях.

5. Показания

Для установки стеклянных пробирок с питательными средами, культурами бактерий и реактивами, в качестве вспомогательного средства в клинической лабораторной диагностике (in vitro).

6. Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и правил эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 2 года с даты продажи.

Гарантийный срок хранения – 3 года с даты изготовления.

7. Противопоказания при применении медицинского изделия

Не применять после истечения срока годности.

8. Технические характеристики и описание

«Штатив лабораторный полимерный для пробирок ШЛПП-40 ТУ 9452-156-05519988-2006» - 40-гнездный.



ОТК _____



Количество 1 шт.

3872.6.873.313-02 ИП

Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Разраб.		Хафизова Ф.Р.		27.07.22
Пров.		Васильев И.И.		27.07.22
Н. контр.		Хафизов А.Р.		27.07.22

ШТАТИВ ЛАБОРАТОРНЫЙ
ПОЛИМЕРНЫЙ ДЛЯ ПРОБИРОК
ШЛПП-40

Инструкция по применению

Лист	Лист	Листов
А	2	5
ООО «Полимерные изделия»		

Корпус, основание штатива должны быть изготовлены из полиэтилена низкого давления или из смеси полиэтилена низкого давления и красителя - концентрата, или суперконцентрата, стойки – из полипропилена или из смеси полипропилена и красителя – концентрата, или суперконцентрата.

Примечание:

Допускается корпус, основание и стойку штатива окрашивать в цвета по требованию заказчика.

Масса одного штатива должна быть не более 0,2 кг.

Схематическое изображение штатива и линейные размеры представлены на рис.1 настоящей инструкции.

9. Меры предосторожности

Не применять после истечения срока годности.

При повторном применении провести дезинфекцию.

10. Возможные побочные эффекты и риски применения.

При надлежащем использовании изделия побочных эффектов не наблюдается.

При использовании изделий по назначению и в соответствии с данной инструкцией риски применения отсутствуют.

11. Указания по эксплуатации

1. Убедиться в действии срока годности изделия.

2. Использовать только по назначению.

12. Порядок применения.

1. Распакуйте изделие, освободив его от упаковочного материала.

2. Соберите штатив:

- установив основание штатива на ровную поверхность, вставьте стойки штатива в отверстия основания до надежной фиксации;

- корпус штатива установите на стойки до надежной фиксации.

3. Провести дезинфекцию согласно п. 13 настоящей инструкции.

13. Дезинфекция.

Штатив подвергается дезинфекции 6% раствором перекиси водорода (ГОСТ 177 или ОСТ 301-02-205) погружением в раствор на 60 минут или двукратным протиранием салфетки из бязи или марли с интервалами между протираниями 15 минут при температуре не менее 18 °С (Приказ МЗ СССР № 408 от 12.07.89 г. «О мерах по снижению заболеваемости вирусным гепатитом в стране»)

14. Комплектность поставки

Комплект поставки штатива должен соответствовать указанному в таблице 1

Наименование детали	Количество
Корпус	1 шт.
Основание	1 шт.
Стойка	6 шт.
<u>Эксплуатационная</u> <u>документация</u>	
Инструкция по применению	1 шт.

15. Условия хранения и транспортирования

Условия транспортирования – 5 (ОЖ4) ГОСТ 15150.

Транспортировка и хранение может проводиться любым видом транспорта в закрытых транспортных средствах в соответствии с действующими на транспорте каждого вида правилами, утверждёнными в установленном порядке.

Условия хранения – 1 (Л) по ГОСТ 15150.

Изделия должны храниться в упаковках предприятия-изготовителя в сухом отапливаемом помещении при температуре от +5 до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 80% при температуре +25 °С на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Избегать воздействия прямых солнечных лучей и значительных колебаний температуры во время хранения.

После транспортирования в условиях отрицательных температур изделия должны быть выдержаны в транспортной таре в условиях хранения не менее 12 часов до использования.

16. Утилизация

Утилизация должна проводиться по правилам, установленным СанПиН 2.1.3684.

Использованные изделия относятся к отходам класса Б по СанПиН 2.1.3684.

Изделия, неиспользованные по прямому назначению по причине окончания срока годности или других причин, относятся к классу А по СанПиН 2.1.3684 и утилизируются как бытовые отходы.

17. Техобслуживание и ремонт

Техническому обслуживанию и ремонту штативы не подлежат.

18. Сведения о рекламациях

Рекламации в установленном порядке предъявляются предприятию – изготовителю по адресу: ООО «Полимерные изделия», Россия, 420021, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Салиха Сайдашева, д. 12.

Тел.: (843) 278-23-05, 278-22-77

E-mail: info@polimizd.ru, www.polimizd.ru



19. Символы



Дата изготовления



Код партии

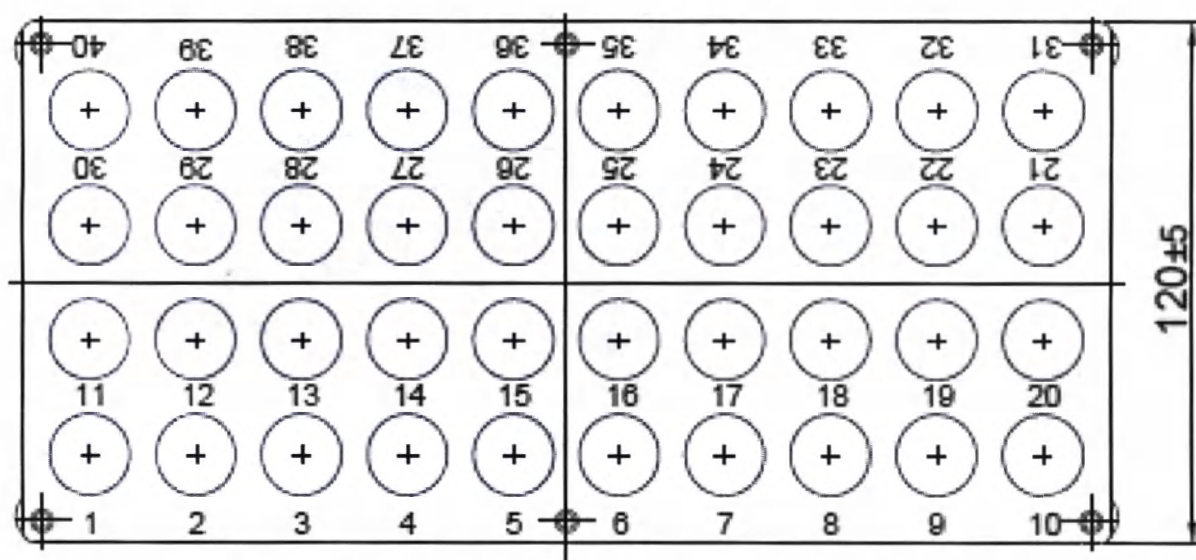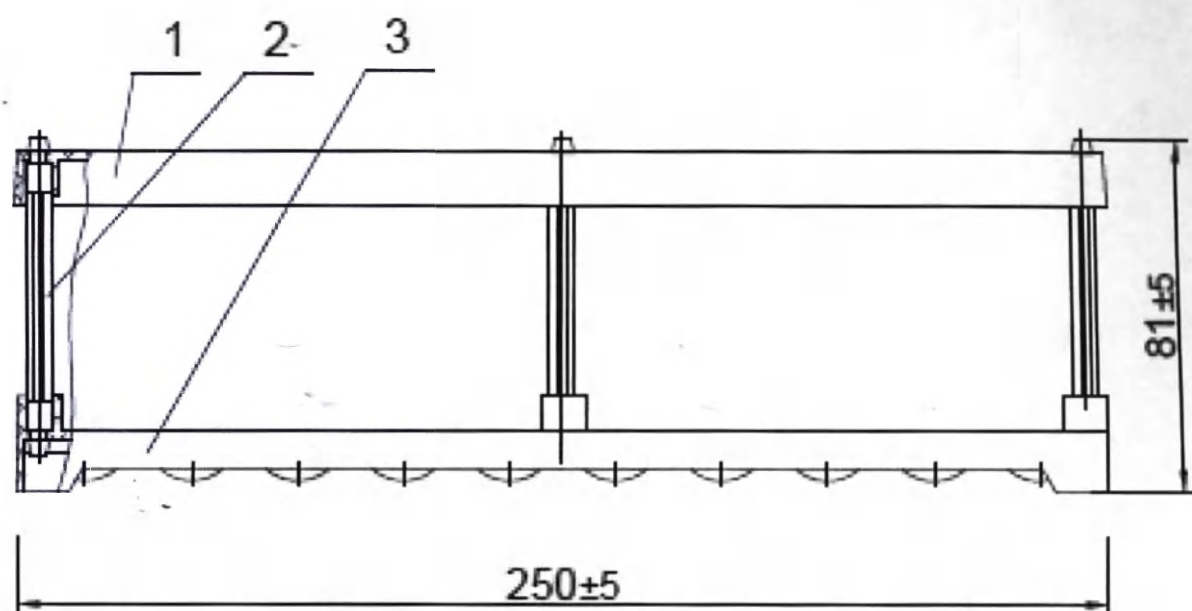


1 - корпус, 2- стойка, 3- основание.

Рисунок 1- Штатив лабораторный полимерный для пробирок ШЛПП-40

Прошито и скреплено печатью

5 (пять) листов

Гл.бухгалтер

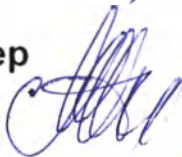

Мухаммедов Ш.М.

