

K [♀] n t a k t	M.S. Life Science Pvt Ltd	PD-17
	KONTAKT	№ выпуска. 03
	Досье продукта	Дата: 04/2014 Страница 25 из 27

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ (помещена в упаковку в качестве листка-вкладыша)

Предназначен для предотвращения зачатия и заболеваний, передающихся половым путём

До начала полового акта	
1. Сместите презерватив внутри упаковки в одну сторону и разорвите упаковку в месте, отмеченном для разрыва. Не разрезайте упаковку при помощи острых предметов и не касайтесь презерватива ногтями, ювелирными украшениями и т.д.	
2. Достаньте презерватив из упаковки, аккуратно зажмите резервуар для спермы на конце презерватива (или сосок), так чтобы воздух вышел, поместите его на головку эрегированного пениса и раскатайте до основания пениса.	
3. Презерватив следует надевать перед вводом пениса в тело партнера.	
После полового акта	
1. Выведите пенис до потери эрекции, придерживая презерватив у основания.	
2. Снимите презерватив с пениса, скатывая его вниз.	
3. После использования завяжите узлом, заверните презерватив в бумагу и выбросите в мусорный ящик в недоступном для детей и животных месте	
4. Помойте руки	
5. Используйте новый презерватив перед каждым половым актом.	

Адрес производителя:
MS Life Science Pvt Ltd,
1861, IInd Floor, Outram Lane,
Kingsway Camp, New Delhi – 110009,
India N.C. No.MH/DRUG/PD-168

Kontakt	M.S. Life Science Pvt Ltd	PD-17
	KONTAKT	№ выпуска. 03
	Досье продукта	Дата: 04/2014 Страница 26 из 27

Важная информация (напечатана на внутренней стороне упаковки)

Детальная информация об изделии

Типы изделия	Формы	Параллельно с резервуаром на конце
	Размер (номинальная ширина в мм)	53 ± 1 мм
	Длина (мм)	≥ 180 мм
	Длина накопителя (мм)	18 ± 1 мм
	Толщина стенки (мм)	0.065 ± 0.015 мм
	Масса (г)	1.6 ± 1 г
	Толщина венчика (мм)	1.6 ± 0.1 мм
	Фактура	Гладкий / с пупырышками / с кольцами / с несколькими видами текстуры
	Цвета	В соответствии с требованиями заказчиков (подлежат утверждению регуляторными органами)
Материалы	Основной материал	Латекс на основе натурального каучука
	Опудривающее вещество или покровное вещество	Применяется мелкодисперсный кукурузный пищевой крахмал
	Аромат	В соответствии с требованиями заказчиков (подлежат утверждению регуляторными органами)
	Смазочное средство	Силиконовое масло
Варианты марки	КОНТАКТ Классик (гладкий)	С ванильным запахом
	КОНТАКТ Доттет (с пупырышками)	С запахом шоколада
	КОНТАКТ Романтик Лав (гладкий)	С запахом клубники
	КОНТАКТ Лайте (с пупырышками)	С запахом апельсина
	КОНТАКТ Риббд (с кольцами)	С запахом банана
	КОНТАКТ Лонг Лав (гладкий с анестетиком)	С запахом лимона
	КОНТАКТ Империял (Мультитекстура с пупырышками + кольцами)	С запахом розы
Типы упаковки:	Прямоугольная пленочная	Упаковки на 3 штуки и упаковки на 12 штук.

1. Не используйте смазки на масляной основе, такие как вазелин, детское масло или крем для рук, так как они могут повредить презерватив.
2. При необходимости используйте смазки на водной основе.
3. Ни один метод контрацепции не дает 100% гарантии защиты.
4. При правильном использовании предотвращает заражение ВИЧ (СПИД) и многих других инфекций, передаваемых половым путем (ИППП).
5. Не используйте презерватив при наличии видимых повреждений упаковки.

K [♂] n t a k t	M.S. Life Science Pvt Ltd	PD-17
	KОНТАКТ	№ выпуска. 03
	Досье продукта	Дата: 04/2014
		Страница 27 из 27

6. Если Вы применяете какие-либо лекарственные препараты в области половых органов (кремы, лосьоны, мази и т.д.), проконсультируйтесь с врачом, чтобы убедиться, что лечение не окажет негативного воздействия на презерватив.
7. Храните презервативы в холодном, сухом месте, вдали от источников тепла и прямых солнечных лучей. Температурный режим хранения и транспортирования от 0°C до +25°C и относительной влажности не выше 80%. Транспортировка осуществляется всеми видами транспорта.
Срок годности 3 года.
8. Не используйте презерватив по истечении срока годности, указанного на упаковке
9. Использование латексных презервативов марки **KОНТАКТ** для целей, отличающихся от вагинального полового акта, может привести к повышению риска повреждения презерватива.
10. Утилизация производится в зависимости от вида материала в соответствии с местными или национальными предписаниями.

