

**ПАМЯТКА ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ**  
**РЕЦИРКУЛЯТОР МЕДИЦИНСКИЙ БАКТЕРИЦИДНЫЙ ПЕРЕДВИЖНОЙ АЭРОЛИТ 550**  
**по ТУ 32.50.50-001-37247008-2020 В ВАРИАНТЕ ИСПОЛНЕНИЯ: РЕЦИРКУЛЯТОР МЕДИЦИНСКИЙ**  
**БАКТЕРИЦИДНЫЙ ПЕРЕДВИЖНОЙ АЭРОЛИТ 550 S**

1. Рециркулятор предназначен для работы в присутствии людей в помещении.
2. Установить рециркулятор в помещении (рекомендации по выбору места расположения приведены на обратной стороне настоящей памятки).
3. Подключить вилку кабеля сетевого съёмного от рециркулятора к розетке ~220 В, 50 Гц.



4. Включить главный выключатель. При этом должна включиться панель оператора.
5. Нажать на кнопку «ПУСК» на панели оператора.
6. Рециркулятор рассчитан на непрерывную работу. Если рециркулятор включается только на период нахождения людей в помещении, то рекомендуется включать рециркулятор за 1 час до прихода людей в помещение и затем оставлять включенным еще 1 час после ухода людей из помещения.

| Максимальный объем помещения | Кратность рециркуляции воздуха через УФ-установку |
|------------------------------|---------------------------------------------------|
| 100 м <sup>3</sup>           | 5 раз в час                                       |

7. Выбрать режим работы рециркулятора на экране панели оператора.

| Режим                                                          | Производительность, м <sup>3</sup> /ч | Корректированный уровень звуковой мощности, дБА, не более | Кол-во включенных ламп | Потребляемая мощность, Вт, ±5Вт |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|
| Рециркулятор медицинский бактерицидный передвижной АЭРОЛИТ 550 |                                       |                                                           |                        |                                 |
| 1                                                              | 320±10%                               | 32                                                        | 1                      | 565                             |
| 2                                                              | 500±10%                               | 40                                                        | 1                      |                                 |

8. Для выключения рециркулятора: нажать на кнопку «СТОП» на панели оператора, затем выключить главный выключатель и отсоединить вилку кабеля сетевого съёмного от розетки.

Более подробная информация в паспорте на рециркулятор.

### Рекомендации по выбору места расположения

Не располагать рециркулятор вблизи решеток вытяжной вентиляции. По возможности поток воздуха, создаваемый рециркулятором, должен совпадать с направлением основных конвективных потоков воздуха в помещении.

Так как рециркулятор работает длительное время, место его размещения должно быть выбрано так, чтобы не создавать неудобств людям, находящимся в помещении.

Рециркулятор рекомендуется устанавливать в помещении не ближе чем в 1 м от радиаторов отопления.

Для свободного доступа воздуха необходимо соблюдать расстояние не менее 30 см от вентиляционных решеток до стен и предметов, препятствующих свободному потоку воздуха.

После окончательного размещения рециркулятора его следует зафиксировать с помощью тормозов на двух колесах.

Должен быть свободный доступ к главному выключателю рециркулятора. В случае возникновения внештатной ситуации необходимо немедленно обесточить рециркулятор!

Допускается использование рециркулятора при температуре воздуха от +10 до +35 °С.

### Меры безопасности

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>ЗАПРЕЩАЕТСЯ!</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ОТКРЫВАТЬ КОРПУС РЕЦИРКУЛЯТОРА ПРИ РАБОТАЮЩЕЙ УФ-ЛАМПЕ</li><li>- ПРОВОДИТЬ ЛЮБЫЕ ОПЕРАЦИИ ВНУТРИ КОРПУСА ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ ЭЛЕКТРОПИТАНИИ</li><li>- ВКЛЮЧАТЬ УФ-ЛАМПУ ВНЕ РЕЦИРКУЛЯТОРА</li><li>- ИСПОЛЬЗОВАТЬ УФ-ЛАМПУ РЕЦИРКУЛЯТОРА НЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ</li><li>- ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И МЕХАНИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ РЕЦИРКУЛЯТОРА БЕЗ СОГЛАСОВАНИЯ С ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ</li><li>- ПОМЕЩАТЬ КАКИЕ-ЛИБО ПРЕДМЕТЫ НА ПОЛКУ ПОДСТАВКИ РЕЦИРКУЛЯТОРА.</li><li>- ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ РЕЦИРКУЛЯТОР БЕЗ ВОЗДУШНЫХ ФИЛЬТРОВ</li><li>- МЕНЯТЬ ФИЛЬТРЫ ВОЗДУШНЫЕ НА РАБОТАЮЩЕМ РЕЦИРКУЛЯТОРЕ</li><li>- ЗАМЕНЯТЬ ФИЛЬТРЫ ВОЗДУШНЫЕ НА ДРУГОЙ ТИП ИЛИ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТРУКЦИЮ ФИЛЬТРОВ ВОЗДУШНЫХ БЕЗ СОГЛАСОВАНИЯ С ИЗГОТОВИТЕЛЕМ РЕЦИРКУЛЯТОРА</li></ul> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Торговый знак, название, контактная информация (телефон, адрес) торгового представителя.

Более подробная информация в паспорте на рециркулятор.

+7 (495) 733-9526, 733-9542, 742-9762, 913-5191

[www.lit-uv.com](http://www.lit-uv.com)

**ЛИТА**

## ПАМЯТКА ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

РЕЦИРКУЛЯТОР МЕДИЦИНСКИЙ БАКТЕРИЦИДНЫЙ ПЕРЕДВИЖНОЙ АЭРОЛИТ 550

по ТУ 32.50.50-001-37247008-2020 В ВАРИАНТЕ ИСПОЛНЕНИЯ: РЕЦИРКУЛЯТОР МЕДИЦИНСКИЙ

БАКТЕРИЦИДНЫЙ ПЕРЕДВИЖНОЙ АЭРОЛИТ 550 ЭКО

1. Рециркулятор предназначен для работы в присутствии людей в помещении.
2. Установить рециркулятор в помещении (рекомендации по выбору места расположения приведены на обратной стороне настоящей памятки).
3. Подключить вилку кабеля сетевого съёмного от рециркулятора к розетке ~220 В, 50 Гц.



Главный  
выключатель

Разъем для  
подключения  
кабеля сетевого  
съёмного



Светодиод  
(зеленый)

Дверь  
рециркулятора

Вентиляционная  
решетка

4. Включить главный выключатель. При этом должен загореться зеленый светодиод на двери рециркулятора.
5. Рециркулятор рассчитан на непрерывную работу. Если рециркулятор включается только на период нахождения людей в помещении, то рекомендуется включать рециркулятор за 1 час до прихода людей в помещение и затем оставлять включенным еще 1 час после ухода людей из помещения.

| Максимальный объем помещения | Кратность рециркуляции воздуха<br>через УФ-установку |
|------------------------------|------------------------------------------------------|
| 100 м <sup>3</sup>           | 5 раз в час                                          |

6. Для выключения рециркулятора выключить главный выключатель и отсоединить вилку кабеля сетевого съёмного от розетки.

Более подробная информация в паспорте на рециркулятор.

+7 (495) 733-9526, 733-9542, 742-9762, 913-5191

[www.lit-uv.com](http://www.lit-uv.com)

**ЛИТА**

### Рекомендации по выбору места расположения

Не располагать рециркулятор вблизи решеток вытяжной вентиляции. По возможности поток воздуха, создаваемый рециркулятором, должен совпадать с направлением основных конвективных потоков воздуха в помещении.

Так как рециркулятор работает длительное время, место его размещения должно быть выбрано так, чтобы не создавать неудобств людям, находящимся в помещении.

Рециркулятор рекомендуется устанавливать в помещении не ближе чем в 1 м от радиаторов отопления.

Для свободного доступа воздуха необходимо соблюдать расстояние не менее 30 см от вентиляционных решеток до стен и предметов, препятствующих свободному потоку воздуха.

После окончательного размещения рециркулятора его следует зафиксировать с помощью тормозов на двух колесах.

Должен быть свободный доступ к главному выключателю рециркулятора. В случае возникновения внештатной ситуации необходимо немедленно обесточить рециркулятор!

Допускается использование рециркулятора при температуре воздуха от +10 до +35 °С.

### Меры безопасности

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>ЗАПРЕЩАЕТСЯ!</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ОТКРЫВАТЬ КОРПУС РЕЦИРКУЛЯТОРА ПРИ РАБОТАЮЩЕЙ УФ-ЛАМПЕ</li><li>- ПРОВОДИТЬ ЛЮБЫЕ ОПЕРАЦИИ ВНУТРИ КОРПУСА ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ ЭЛЕКТРОПИТАНИИ</li><li>- ВКЛЮЧАТЬ УФ-ЛАМПУ ВНЕ РЕЦИРКУЛЯТОРА</li><li>- ИСПОЛЬЗОВАТЬ УФ-ЛАМПУ РЕЦИРКУЛЯТОРА НЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ</li><li>- ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И МЕХАНИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ РЕЦИРКУЛЯТОРА БЕЗ СОГЛАСОВАНИЯ С ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ</li><li>- ПОМЕЩАТЬ КАКИЕ-ЛИБО ПРЕДМЕТЫ НА ПОЛКУ ПОДСТАВКИ РЕЦИРКУЛЯТОРА.</li><li>- ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ РЕЦИРКУЛЯТОР БЕЗ ВОЗДУШНЫХ ФИЛЬТРОВ</li><li>- МЕНЯТЬ ФИЛЬТРЫ ВОЗДУШНЫЕ НА РАБОТАЮЩЕМ РЕЦИРКУЛЯТОРЕ</li><li>- ЗАМЕНЯТЬ ФИЛЬТРЫ ВОЗДУШНЫЕ НА ДРУГОЙ ТИП ИЛИ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТРУКЦИЮ ФИЛЬТРОВ ВОЗДУШНЫХ БЕЗ СОГЛАСОВАНИЯ С ИЗГОТОВИТЕЛЕМ РЕЦИРКУЛЯТОРА</li></ul> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Торговый знак, название, контактная информация (телефон, адрес) торгового представителя.


Более подробная информация в паспорте на рециркулятор.

+7 (495) 733-9526, 733-9542, 742-9762, 913-5191

[www.lit-uv.com](http://www.lit-uv.com)

**ЛИТА**

u  
" e Oe c e J ))'  
./ " #%)%)")(\* \$&\$"+\*##' E " e  
Oe c e J ))'  
2 /, . 6 ? , 5 ( . %/ % ( & ( . 4 - #  
% ( 2 /, ( . 4 - C 4 2 . ( 5 / 4 % %. ' ,  
.( 5 % % , - . 4, D#  
<# &? ( / 5 , % ( \* %sw4 \* 2 /, 6 ))) 0A G2#

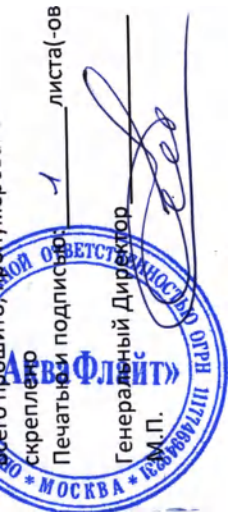

.,87;M  
8; :W9,16:>

,Av65 D:L  
./D :W9674L  
, 6:L -6168//  
-vw57//

,76:>  
/.60,1/0,

860>  
06R40 B:L1/0,

6714:LR4/77,L  
06F61 ,

L# &? \* ( ( &? # 1 4 ' ( &? %, . . #  
A# + ' . / I" . . #  
A6 2 /, %%%? . ( /& 5 /# % 2 /, ( &? %, .  
3' , & ( . 4 - 0 4 / %, ( &? 2 /, 6 M? %  
. 3 & ( . 4 - 6 4 % ( , ( &? 4 - M? % . % /3  
& 6 . 4 - ,#

\$ % 4 5s 4 . 4 - , % 2 /, 2 ( 6/3  
? 6 U /% (/

M 4x A 6(?%

B# 5 ' 4 5 2 /, 1 . . #

' 4 6( y ( 5, 4,  
% 0 4 ? / ( 6 / ( ( &? 3 4. 4 - % 0 0 zA  
4 - % 0 T 0 5

2 /, 4 2 % 5 2 . (' EH! AA

M <) zM { <) M A=A  
) A zM { L M

K# , ( &? , 2 /, P ' . / I H" . . 0 6 4  
( &? \* ( ( &? % ( / 5 , % ( \* %sw4 \*  
6 #

/:66 ./D0/ 7,L 47X/05,R4L 8 .,-./016 7, 06R40 B:L1/0%

dd