



Luminos Agile Max, Luminos dRF Max, LUMINOS Lotus Max, Luminos dRF, Luminos Agile, Axiom Luminos TF

Дополнение – Подножка

2023-02-10

Dr. Stefan Trautner
Head of Regulatory Affairs
Siemens Healthcare GmbH

■ 1	Подножка	3
1.1	Применение	3
1.2	Установка	4
1.3	Примеры неправильной установки	6

1 Подножка

1.1 Применение

Приспособление для укладки пациента во время обследования в положении стоя или сидя и для дополнительного использования вместе с стоподержателем для лежачих больных в положении Тренделенбурга.

Максимальный допустимый вес пациента на подножке составляет 230 кг (500 фунтов).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Подножка закреплена ненадежно

Соскальзывание пациента со стола с возможными порезами и другими травмами

- ◆ Убедитесь, что подножка прочно закреплена, покачав и подняв ее.
- ◆ Убедитесь, что на с каждой стороны подножки видны две зеленые полосы.
- ◆ Устанавливайте и снимайте ее, только когда стол находится в горизонтальном положении.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Подножка перегружена

Подножка отрывается или ломается, в результате чего пациент получает травму

- ◆ Нагрузка на подножку не должна превышать 230 кг.
- ◆ Если пациент весит более 230 кг, не наклоняйте стол более чем на 45°.
- ◆ Следите за тем, что пациент может устойчиво стоять на подножке.
- ◆ Максимально допустимая нагрузка на стол пациента составляет 300 кг.

ВНИМАНИЕ!

Подсоединение или отсоединение подножки

Опасность травм

- ◆ При работе с подножкой учитывайте ее большой вес. Вес подножки: ~ 15 кг.



Подножка может быть прикреплена и к головному концу стола пациента, если для укладки пациент должен быть развернут (головной конец слева).

В головном и в ножном конце стола пациента предусмотрены три положения для крепления подножки с интервалом в 20 см.

Вычислитель высоты потолка в помещении не учитывает подножку, установленную в головном конце стола.


Будьте особенно внимательны при наклоне или вертикальном подъеме стола с подножкой, закрепленной в его головном конце, и стола с выдвинутой декой.

1.2 Установка

✓ Стол пациента в горизонтальном положении.




- 1 Удерживая подножку за опорные ручки и повернув ее набок, надавите на подпружиненные части опорных ручек.
Две красные кнопки (1) с каждой стороны должны быть видны.
- 2 Сначала наклоните подножку влево и подвесьте ее на направляющую принадлежностей (2) с левой стороны. Плотнo усадите левую опорную ручку на направляющей принадлежностей и отпустите подпружиненные части левой опорной ручки (3).
- 3 Затем опустите правую сторону на направляющую принадлежностей и отпустите подпружиненные части правой опорной ручки (4).

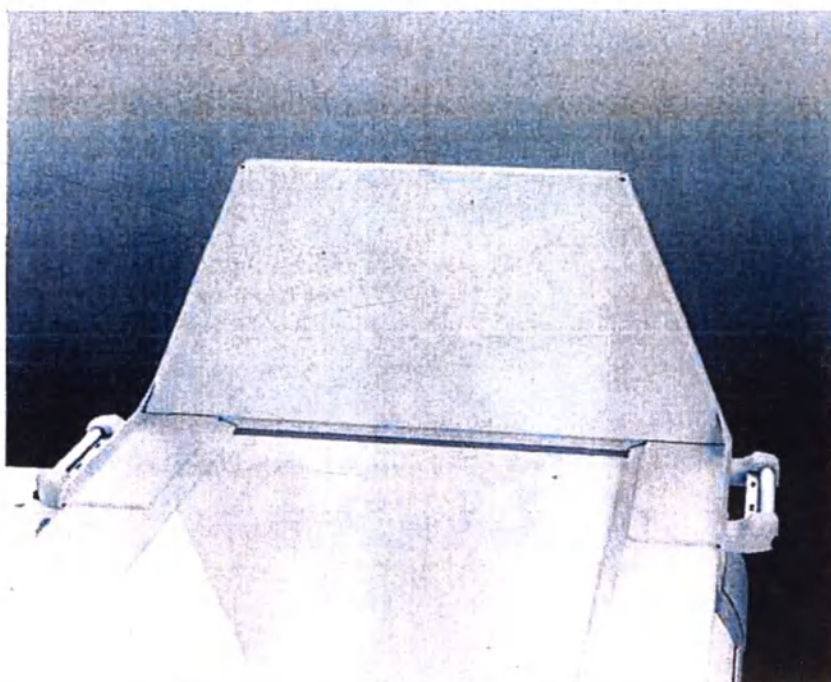

- 4 Подвигайте подножку вперед и назад, чтобы она встала на место, пока не услышите щелчок.

Две красные кнопки должны быть заподлицо с ручкой, а два зеленых стержня должны быть видны на обеих опорных ручках.

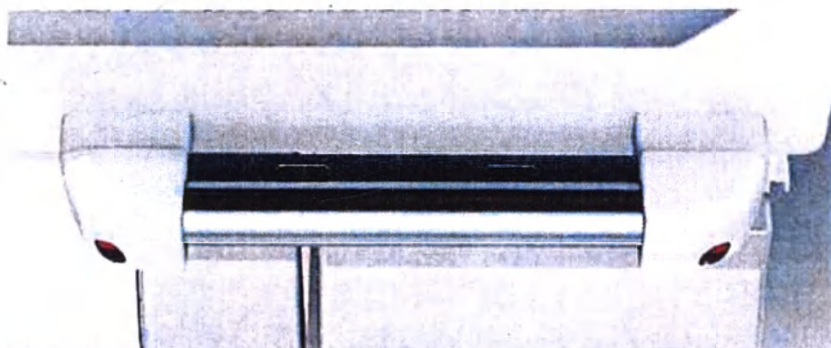

- 5 Можно с силой потрясти подножку, взявшись за нее саму (не за опорные ручки). Убедитесь, что обе стороны подножки надежно прикреплены к столу.
- 6 Позиционируйте пациента.



Перед тем как пациент сядет или встанет на подножку, не забудьте проверить надежность ее крепления.

Убедитесь, что пациенты, стоящие на подножке, держатся за опорную ручку или планку-поручень.


⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Стол наклонен в положение Тренделенбурга (опущенное изголовье)


Соскальзывание пациента со стола головой вниз

- ♦ Используйте плечевые опоры, чтобы предотвратить соскальзывание пациента со стола.
- ♦ Если стол необходимо наклонить больше, чем положение Тренделенбурга 15° (опущенное изголовье), в дополнение к плечевым опорам используйте стоподержатели.

1.3 Примеры неправильной установки

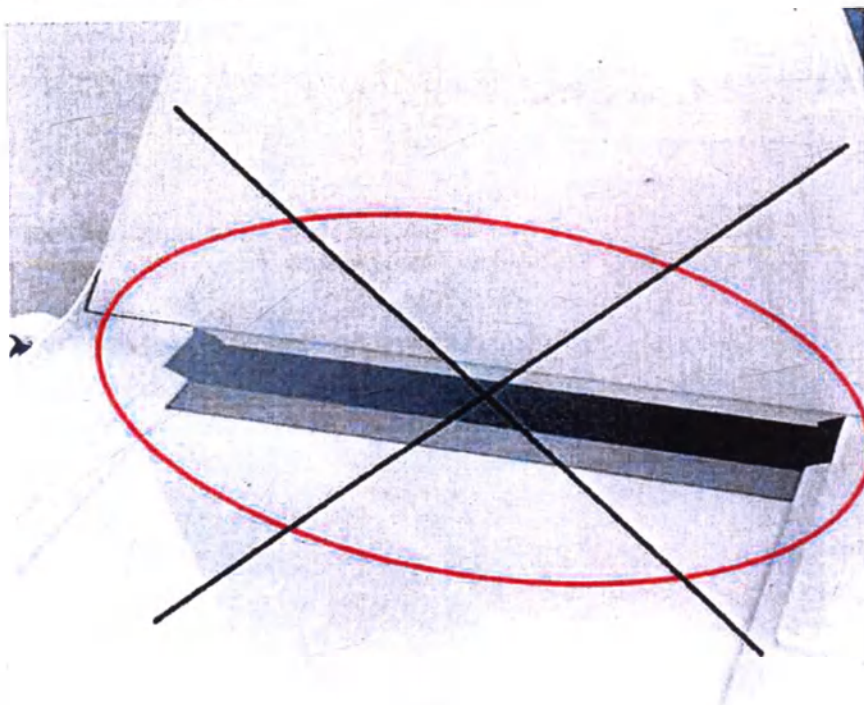

Между краем деки стола и подножкой не должно быть видимого зазора.

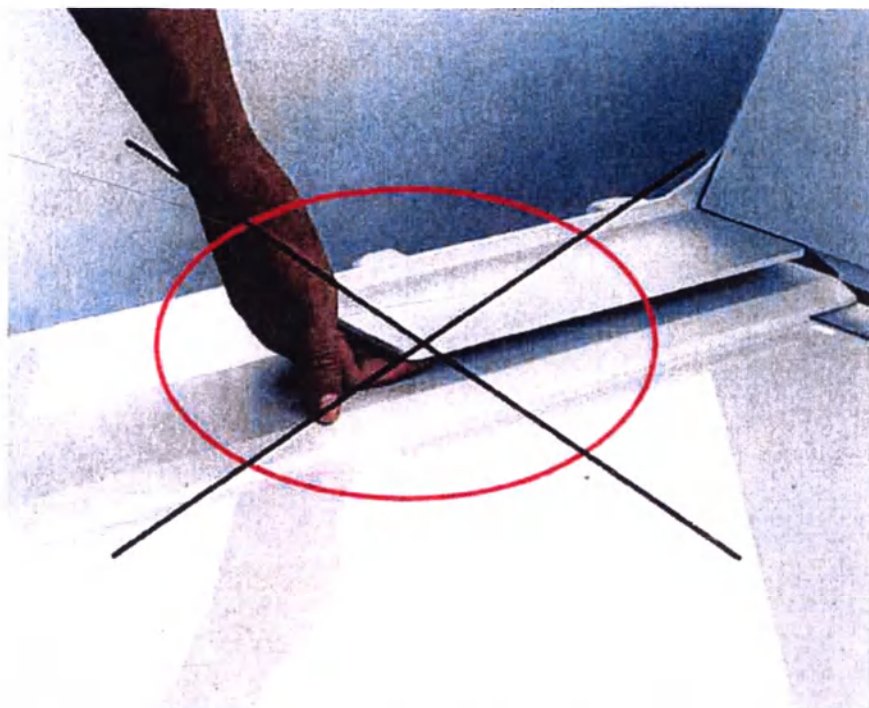

Подножка должна плотно прилегать к деке стола. Если зазор слишком большой (как на рисунке выше), значит подножка не закреплена. Пальцы не должны проходить между подножкой и столом.



0123

**Штаб-квартира Siemens
Healthineers**
Siemens Healthcare GmbH
Henkestr. 127
91052 Erlangen
Германия
Телефон: +49 9131 84-0
siemens-healthineers.com

Производитель
Siemens Healthcare GmbH
Henkestr. 127
91052 Erlangen
Германия

I certify herewith that this copy is
true copy of the original document,
which was presented to me.

Forchheim,

FEB 10 2023

Notary Public



Заверенная копия

**Luminos Agile Max,
Luminos dRF Max,
LUMINOS Lotus Max,
Luminos dRF, Luminos
Agile, Axiom Luminos TF**

Дополнение – Подножка

10.02.2023

/подпись/

Д-р Стефан Траутнер (Stefan Trautner)

Руководитель отдела регистрации и сертификации

"Сименс Хэлскеа ГмбХ" (Siemens Healthcare GmbH)

[siemens-healthineers.com](https://www.siemens-healthineers.com)

SIEMENS
Healthineers 

Настоящим свидетельствую верность копии с представленного мне оригинала документа.

Форххайм, 10 февраля 2023 года

/подпись/

Нотариус

/Печать: Марсел Ноймайер (Marcel Neumair), нотариус в Форххайме/

Саная Анаит Левоновна

Саная

Российская Федерация

Город Москва

Третьего апреля две тысячи двадцать третьего года


Я, Белякова Ирина Ивановна, временно исполняющий обязанности нотариуса города Москвы Гончаровой Ларисы Николаевны, свидетельствую подлинность подписи переводчика Саная Анаит Левоновны.

Подпись сделана в моем присутствии.

Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: № 77/134-н/77-2023-2-826.

Уплачено за совершение нотариального действия: 400 руб. 00 коп.

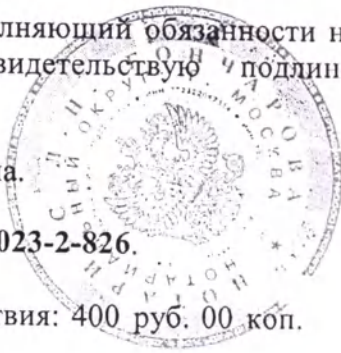

И.И. Белякова

И.И.Белякова

Прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью 7 (семь) листов.

И.И. Белякова

И.И.Белякова

Российская Федерация

Город Москва

Третьего апреля две тысячи двадцать третьего года

Я, Белякова Ирина Ивановна, временно исполняющий обязанности нотариуса города Москвы Гончаровой Ларисы Николаевны, свидетельствую верность копии с представленного мне документа.

Зарегистрировано в реестре: № 77/134-н/77-2023-2-827.

Уплачено за совершение нотариального действия: 1200 руб. 00 коп.



И.И.Белякова

Прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью 8 (восемь) листов.

И.И.Белякова