

«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник ФКУ ИК-3

ГУФСИН России по Иркутской области

подполковник внутренней службы

Д.С.Федоров

**Инструкция по применению комбинезона  
из нетканых материалов одноразового использования  
по ТУ 32.50.50-095-08830505-2020, изв.1,2,3,4,5,6**

**Описание:** Комбинезон из нетканых материалов (состав сырья: полипропиленовое ламинированное полиэтиленом нетканое полотно поверхностной плотностью не менее 42 г/м<sup>2</sup>-100%, производитель ООО «Котовский завод нетканых материалов» Тамбовская обл., г.Котовск, ул.Кирпичная, д.1Е) одноразового использования (далее – комбинезон) прямого силуэта, с втачным капюшоном, с центральной бортовой застежкой-молния, с втачными рукавами. Лицевой вырез капюшона, низ рукавов, низ брюк и спинка в области талии стянуты эластичной тесьмой.

**Назначение:** Комбинезон предназначен для одноразового использования в качестве средства индивидуальной защиты в целях профилактики инфекционных заболеваний, для предотвращения заражения микроорганизмами и загрязнения физиологическими жидкостями медицинскими работниками и работниками других служб, которые могут иметь непосредственный контакт с больными и участвовать при локализации, ликвидации очагов инфекции и проведении санитарно-противоэпидемических, профилактических мероприятий.

**Комплектность поставки:**

Комбинезон из нетканых материалов одноразового использования по ТУ 32.50.50-095-08830505-2020, изв.1,2,3,4,5,6 в вариантах исполнения:

1. Комбинезон из нетканых материалов одноразового применения, размер 96-100: рост 170-176 см, длина 172 см, окружность груди 96-100 см, рукав 84 см в составе:

- Комбинезон - 1 шт.
- Инструкция по применению - 1 шт.

2. Комбинезон из нетканых материалов одноразового применения, размер 104-108: рост 176-182 см, длина 178 см, окружность груди 104-108 см, рукав 86,5 см в составе:

- Комбинезон - 1 шт.
- Инструкция по применению - 1 шт.

3. Комбинезон из нетканых материалов одноразового применения, размер 112-116: рост 182-188 см, длина 184 см, окружность груди 112-116 см, рукав 89 см в составе:

- Комбинезон - 1 шт.
- Инструкция по применению - 1 шт.

4. Комбинезон из нетканых материалов одноразового применения, размер 120-124: рост 188-194 см, длина 190 см, окружность груди 120-124 см, рукав 91,5 см в составе:

- Комбинезон - 1 шт.
- Инструкция по применению - 1 шт.

### Потенциальные потребители:

- медицинские работники и работники других служб, которые могут иметь непосредственный контакт с больными и участвовать при локализации, ликвидации очагов инфекции и проведении санитарно-противоэпидемических, профилактических мероприятий.

### Технические и функциональные характеристики:

Комбинезон нестерильный однократного использования, может использоваться в медицинских организациях и вне медицинских организаций.

Готовое изделие не должно расслаиваться, распадаться или разрываться во время использования.

Комбинезон изготавливается в соответствии с требованиями ТУ 32.50.50-095-08830505-2020, изв.1,2,3,4,5,6:

- размеры комбинезона должны соответствовать росту и обхвату груди типовой фигуры человека, указанными в таблице 1;

Таблица 1

| Обхват груди типовой фигуры человека, см | Интервал обхвата груди человека, см | Рост типовой фигуры человека, см | Интервал роста человека, см |
|------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| 96-100                                   | от 94 до 102                        | 170-176                          | от 167 до 179               |
| 104-108                                  | от 103 до 110                       | 176-182                          | от 173 до 185               |
| 112-116                                  | от 111 до 118                       | 182-188                          | от 179 до 191               |
| 120-124                                  | от 119 до 126                       | 188-194                          | от 185 до 197               |

- измерения готовых комбинезонов должны соответствовать измерениям, указанным в таблице 2 и на рисунке 3;

Таблица 2

| Номер измерения | Наименование измерения                                      | Размер, см     |                 |                 |                 | Допускаемое отклонение, см |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------|
|                 |                                                             | 170,176-96,100 | 176,182-104,108 | 182,188-112,116 | 188,194-120,124 |                            |
| 1               | Длина комбинезона от угла плечевого шва и горловины до низа | 172,0          | 178,0           | 184,0           | 190,0           | ± 2,0                      |
| 2               | Ширина комбинезона на уровне глубины проймы                 | 66,0           | 70,0            | 74,0            | 78,0            | ± 1,0                      |
| 3               | Длина рукава с плечом                                       | 84,0           | 86,5            | 89,0            | 91,5            | ± 1,5                      |
| 4               | Ширина рукава на уровне глубины проймы                      | 30,5           | 31,4            | 32,3            | 33,1            | ± 1,0                      |
| 5               | Ширина комбинезона на уровне среднего шва                   | 40,0           | 42,0            | 44,0            | 46,0            | ± 1,0                      |
| 6               | Длина по шаговому шву                                       | 80,0           | 83,5            | 87,0            | 90,5            | ± 1,0                      |

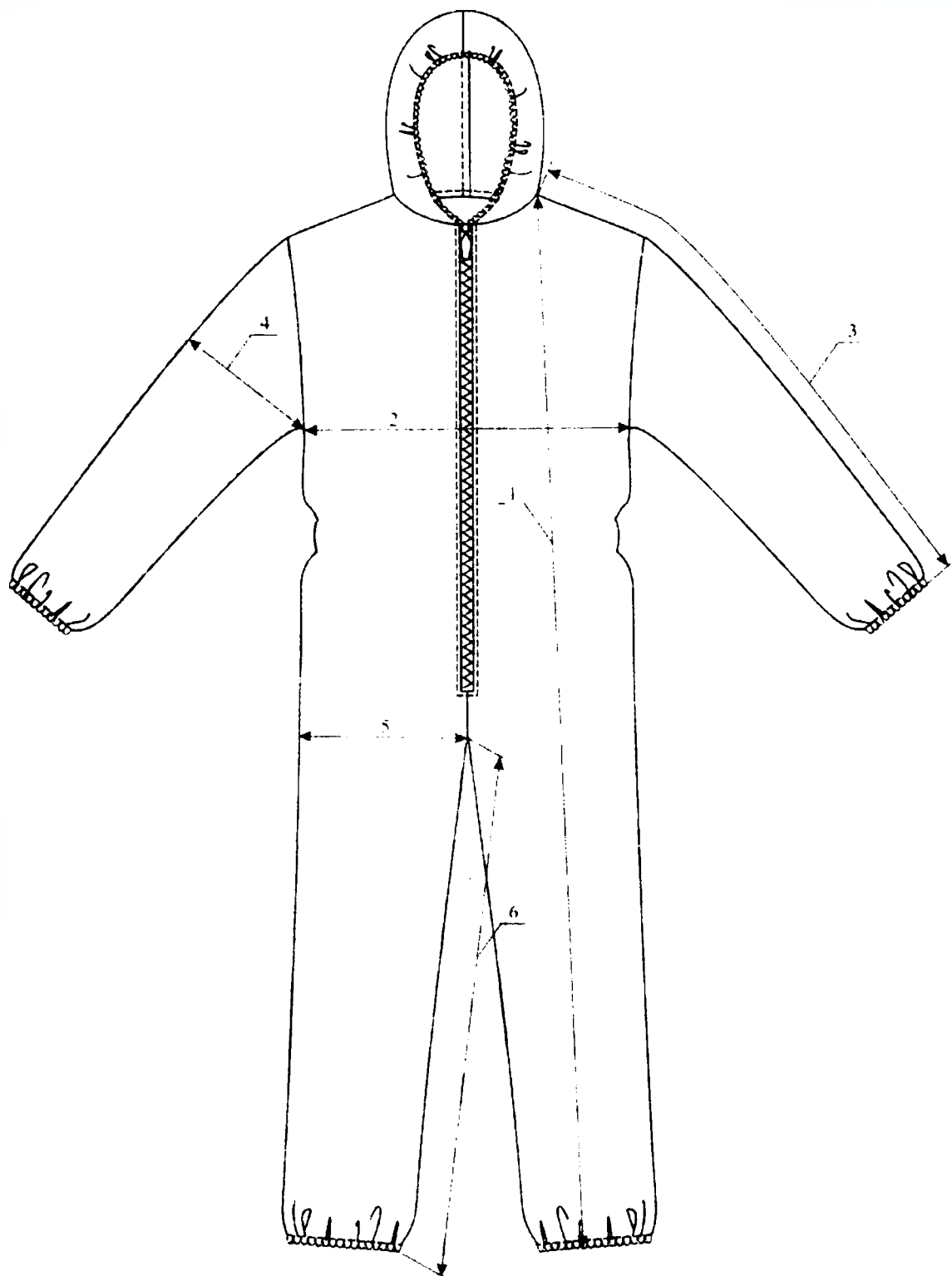


Рисунок 3

- раскрой деталей комбинезона по длине вдоль или поперек полотна;
- классификация стежков, строчек и швов, применяемых для изготовления комбинезона – по ГОСТ 12807;
- методы технологической обработки – в соответствии с п.2.5.7;
- в готовых изделиях не допускаются сквозные повреждения материала, потертости и сдиры ламинирующего покрытия, допускается небольшая морщинистость на криволинейных участках швов.

По функциональным характеристикам комбинезоны должны соответствовать таблице 3 и требованиям ГОСТ EN 13795-1-2011.

Таблица 3

| Характеристика                               | Единица измерения                  | Значение показателя  |
|----------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|
| Микробная проницаемость в сухом состоянии    | Lg (CFU)                           | < 2 <sup>a),c)</sup> |
| Микробная проницаемость во влажном состоянии | BI                                 | Не требуется         |
| Микробная чистота                            | Lg                                 | < 2 <sup>a),c)</sup> |
| Чистота в части инородных частиц             | IPM                                | < 3,5                |
| Пылеворсоотделение                           | Lg (от подсчитанных частиц корпии) | < 4,0                |
| Водоупорность                                | см, НгО                            | > 10                 |
| Прочность на разрыв в сухом состоянии        | кПа                                | > 40                 |
| Прочность на разрыв во влажном состоянии     | кПа                                | Не требуется         |
| Прочность на растяжение в сухом состоянии    | Н                                  | > 20                 |
| Прочность на растяжение во влажном состоянии | Н                                  | Не требуется         |

#### Указание по применению

Эксплуатация комбинезона должна осуществляться в соответствии с указаниями, изложенными в инструкции по применению комбинезона.

Комбинезон является одноразовым медицинским изделием, ремонту и техническому обслуживанию не подлежит.

Время носки комбинезона не более 6 часов.

#### Применение:

Комбинезон надевают и снимают вне помещения с потенциальным риском заражения, перед зеркалом, не спеша, в строго определенной последовательности, с тем, чтобы во время работы не поправлять части комбинезона.

##### Порядок надевания комбинезона:

Комбинезон надевают путем поочередного продевания ног в брюки, а затем рук в рукава, затем застегивается застежка-молния, надевается капюшон. Нижний край рукавов должен находиться у основания кистей и плотно прилегать к рукам, нижний край брюк – у основания щиколоток и плотно прилегать к ногам, капюшон полностью закрывать волосы и уши, горловина комбинезона должна плотно прилегать к шее, открытые участки одежды должны отсутствовать. Комбинезон должен обеспечивать комфортность движения человека.

##### Порядок снятия комбинезона:

Комбинезон снимают путем расстегивания застежки-молния, затем снимается капюшон, выворачивая наизнанку. Комбинезон аккуратно снимается с плеч, поочередно вынимаются руки из рукавов и ноги из брюк, выворачивая изделие наизнанку и избегая

контакта поверхности материала с открытыми участками тела и одеждой. Использованный комбинезон аккуратно сворачивается с изнаночной стороны, помещается в специальный контейнер или пакет для сбора отходов класса Б.

Время носки комбинезона не более 6 часов.

### **Противопоказания, возможные побочные воздействия**

Возможны кожные аллергические реакции на применяемые материалы, при появлении которых следует прекратить применение комбинезона.

### **Меры предосторожности:**

Запрещается касаться внешней стороны комбинезона руками.

После снятия использованного по назначению комбинезона необходимо обработать руки в дезинфицирующем растворе и тщательно вымыть теплой водой с мылом.

Категорически запрещается использовать изделие вторично.

### **Транспортирование и хранение**

Комбинезоны в упакованном виде транспортируют в соответствии с требованиями ГОСТ 7000.

Транспортирование комбинезонов производится в упакованном виде всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта и обеспечивающими сохранность изделий от атмосферных воздействий. Температура от  $-40^{\circ}\text{C}$  до  $+50^{\circ}\text{C}$ . Влажность – до 85%.

Изделия должны храниться в крытых складских помещениях на стеллажах и быть защищены от прямого попадания солнечных лучей и атмосферных воздействий. Температура от  $-40^{\circ}\text{C}$  до  $+50^{\circ}\text{C}$ . Влажность – до 85%.

### **Утилизация:**

Использованное по назначению изделие утилизируется в порядке, предусмотренном СанПиН 2.1.3684 21 для медицинских отходов класса Б.

Неиспользованное по назначению изделие, а также изделие с истекшим сроком годности утилизируется в порядке, предусмотренном СанПиН 2.1.3684 21 для медицинских отходов класса А.

Использованный по назначению упаковочный материал утилизируется в порядке, предусмотренном СанПиН 2.1.3684 21.

### **Срок годности:**

Гарантийный срок хранения – 3 года с даты изготовления при условии соблюдения правил транспортирования и хранения. После истечения срока годности изделие необходимо утилизировать.

### **Производитель:**

ФКУ ИК-3 ГУФСИН России по Иркутской области (место производства 664001, г.Иркутск, ул.Писарева, 13, тел.8(3952)349542, адрес электронной почты: [fgu\\_ik-3@mail.ru](mailto:fgu_ik-3@mail.ru)).

### **Претензии потребителей отправлять по адресу:**

664019, г.Иркутск, ул. Писарева, 13, тел.8(3952)349542

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

5 (пять)

листов.

Врио заместителя начальника учреждения –

начальника центра

майор внутренней службы

Д.В. Барановский

«18»

08

2023г.

