

ОТСАСЫВАТЕЛЬ ОНП-600

**Отсасыватель ножной
объемом контейнера-
сборника 600 мл.**

**Руководство по эксплуатации
МИ 50.00.00 РЭ**

* НАЗНАЧЕНИЕ

Отсасыватель ОНП-600 предназначен для аспирации жидкого содержимого из дыхательных путей перед проведением искусственной вентиляции легких.

Применяется в транспортных средствах скорой помощи, служб МЧС, медицины катастроф, отделениях интенсивной терапии и реанимационных отделениях клиник.

* ОСОБЕННОСТИ АППАРАТА

Основными отличиями отсасывателя являются: большой объем контейнера-сборника – 600 мл.; создание разряжения в вакуумной камере, которая одновременно является и контейнером-сборником, как при прямом так и при обратном нажатии на педаль и возможность продолжения отсасывания после заполнения контейнера-сборника, в связи с чем нет необходимости в устройстве от переполнения.

* ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие отсасывателя требованиям технических условий при соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения и не несет ответственности, если нарушение указанных в настоящем паспорте и специальной литературе правил привело к неблагоприятным последствиям для пациента.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию. В течение гарантийного срока изготовитель безвозмездно ремонтирует или заменяет отсасыватель и его части.

Адрес изготовителя: 107258, Москва, ул. Бухвостова, 12/11, корп.17, НИИДАР, ООО "МИГК-М", телефон (495) 962-01-75, 223-62-64.

• ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Объем сборника жидкости не менее	600мл
Разряжение за 10 с. не менее	70 кПа
Производительность по искусственной рвотной массе не менее.....	2 л/мин
Свободный расход воздуха не менее	0.33 л/с
Внутренний диаметр отсасывающей трубки не менее	8 мм
Длина отсасывающей трубки не менее.....	1.35 м
Масса без упаковки не более.....	0.7 кг
Габаритные размеры не более.....	210x110x100

• КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Отсасыватель.....	1 шт.
Трубки с наконечниками.....	1 шт.
Руководство по эксплуатации.....	1 шт.
Упаковка (футляр).....	1 шт.

Примечание: по желанию потребителя комплект поставки может быть изменен или дополнен.

***УСТРОЙСТВО ОТСАСЫВАТЕЛЯ**

Составные части отсасывателя показаны на рис.1

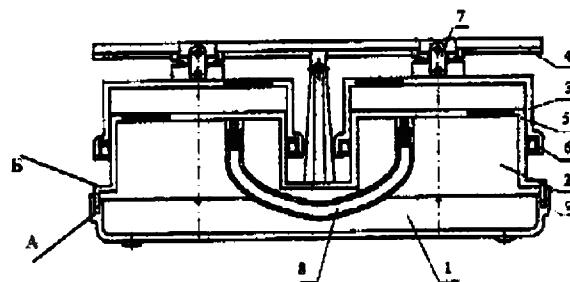


Рис 1.

1. Основание
2. Камера вакуумная
3. Поршень — 2 шт.
4. Педаль
5. Клапан — 4 шт.
6. Кольцо уплотнительное — 2 шт.
7. Серьга — 2 шт. (в сборе с поршнем)
8. Трубка соединительная
9. Прокладка уплотнительная
10. Отсасывающая трубка (на рис. не показана)

А — уровень жидкости до цветной прокладки — 150 мл.

Б — уровень жидкости до кромки камеры — 300 мл.

Общий объем жидкости при полном заполнении основания и камеры — 600 мл.

После полного заполнения можно продолжать отсасывание.

***РАЗБОРКА, СБОРКА, ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ**

Отсасыватель поставляется в собранном виде.

Для подготовке к работе проведите обеззараживание составных частей отсасывателя (см. ниже).

Отсоедините педаль с двумя поршнями для чего потяните педаль вверх. Поверните поршни против часовой стрелке и отсоедините их от педали. Разнимите камеру вакуумную и основание. Снимите соединительную трубку со шгуцеров вакуумной камеры.

Сборку осуществляйте в обратном порядке.

Проверьте работоспособность отсасывателя:

подсоедините угольник отсасывающей трубки к входному отверстию отсасывателя. Нажмите несколько раз на педаль, на перекрытом пальцем отверстии наконечника трубки должно ощущаться разрежение. Отсасыватель готов к работе.

***РАБОТА**

Введите наконечник отсасывающей трубки в дыхательные пути. При необходимости к наконечнику присоедините катетер (в комплект поставки не входит). Нажимайте ногой на педаль, отсасывание происходит при нажатии на педаль как в прямом так и в обратном направлении. За 4-5 нажатий происходит наполнение жидкостью основания и камеры вакуумной, отсасывание можно продолжать и после наполнения, при этом жидкость будет выливаться из отсасывателя.

Для очистки отсасывателя разнимите основание и вакуумную камеру и слейте жидкость. Проведите обеззараживание отсасывателя произведя его разборку (см. выше).

*** МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ**

- Не допускается эксплуатация отсасывателя без тщательного ознакомления с настоящим паспортом.

- К работе с отсасывателем должен допускаться медицинский персонал, имеющий необходимую подготовку.

- Каждый раз перед началом работы и после каждой разборки/сборки для обеззараживания необходимо проверить работоспособность аппарата (см. стр. 4).

• ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ

Произведите разборку отсасывателя (см. выше)

Все детали отсасывателя и отсасывающая трубка подвергаются автоклавированию в течении 45 мин. при температуре 132 °С, после промывки под струей воды. Допускается проводить дезинфекцию в следующей последовательности:

- промывка под струей воды;
- замачивание на 20 мин. в 3% растворе перекиси водорода с добавлением 0,5% синтетического моющего средства при температуре раствора 50°С;
- мойка в течение 5 мин. тампонами тем же раствором;
- ополаскивание стерильной водой;
- сушка в асептических условиях до исчезновения следов влаги.

После сборки проверьте работоспособность отсасывателя (стр.4)

* УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправности аппарата могут быть вызваны ошибками при сборке после обеззараживания. Проверьте правильность сборки в соответствии со стр.4.

* ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Для транспортирования или длительного хранения уложите аппарат в футляр, заверните его в полиэтиленовую пленку и положите в картонную коробку. Условия хранения: температура от – 50 до + 50 °С, влажность воздуха до 98% при 25 °С

*** СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ**

Аппарат утилизируется обычным способом, применяемым для изделий, не представляющим опасности.

*** СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ**

Дата изготовления _____

Подпись лица, ответственного за приемку, _____

М.П.