



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Орто Кубань-Юг»

Тел: +7 (861) 222-58-96, +7 (918) 162-50-46
E-mail: ksp_123@mail.ru

350047, Россия, Краснодарский край,
г. Краснодар, проезд 3-й линии, д. 4

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Орто Кубань-Юг»
Каплиева Н.А.
«30» сентября 2022 г.

Инструкция по применению

**Обувь ортопедическая сложная,
варианты исполнения
по ТУ 32.50.22-001-26410155-2021**

Дата последней редакции «Инструкции по применению» – 30.09.2022 г.

1. Информация о медицинском изделии (МИ)

Обувь ортопедическая сложная по ТУ 32.50.22-001-26410155-2021, варианты исполнения:

1. Обувь ортопедическая сложная малолетская:

1.1. Сандалеты, модель СДс-МД-К1-145

цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: термоэластопласт.

1.2. Инструкция по применению.

2.1. Сандалеты, модель СДс-МД-К1-145

цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: полиуретан.

2.2. Инструкция по применению.

3.1. Сандалеты, модель СДс-МД-К1-145

цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: микропористая резина.

3.2. Инструкция по применению.

4.1. Сандалеты, модель СДс-МД-К1-150

цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: термоэластопласт.

4.2. Инструкция по применению.

5.1. Сандалеты, модель СДс-МД-К1-150

цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: полиуретан.

5.2. Инструкция по применению.

6.1. Сандалеты, модель СДс-МД-К1-150

цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: микропористая резина.

6.2. Инструкция по применению.

7.1. Сандалеты, модель СДс-МД-К1-155

цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: термоэластопласт.

7.2. Инструкция по применению.

8.1. Сандалеты, модель СДс-МД-К1-155

цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: полиуретан.

8.2. Инструкция по применению.

9.1. Сандалеты, модель СДс-МД-К1-155

цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: микропористая резина.

9.2. Инструкция по применению.

10.1. Сандалеты, модель СДс-МД-К1-160

цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: термоэластопласт.

10.2. Инструкция по применению.

11.1. Сандалеты, модель СДс-МД-К1-160

цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: полиуретан.

11.2. Инструкция по применению.

12.1. Сандалеты, модель СДс-МД-К1-160

цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: микропористая резина.

12.2. Инструкция по применению.

13.1. Сандалеты, модель СДс-МД-К1-165

цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: термоэластопласт.

13.2. Инструкция по применению.

14.1. Сандалеты, модель СДс-МД-К1-165

цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: полиуретан.

14.2. Инструкция по применению.

15.1. Сандалеты, модель СДс-МД-К1-165

цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: микропористая резина.

15.2. Инструкция по применению.

II. Обувь ортопедическая сложная дошкольная:

1.1. Сандалеты, модель СДс-ДШ-К1-170

цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: термоэластопласт.

1.2. Инструкция по применению.

2.1. Сандалеты, модель СДс-ДШ-К1-170

цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: полиуретан.

2.2. Инструкция по применению.

3.1. Сандалеты, модель СДс-ДШ-К1-170

цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: микропористая резина.

3.2. Инструкция по применению.

4.1. Сандалеты, модель СДс-ДШ-К1-175

цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: термоэластопласт.

4.2. Инструкция по применению.

5.1. Сандалеты, модель СДс-ДШ-К1-175

цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: полиуретан.

5.2. Инструкция по применению.

6.1. Сандалеты, модель СДс-ДШ-К1-175

цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: микропористая резина.

6.2. Инструкция по применению.

7.1. Сандалеты, модель СДс-ДШ-К1-180

цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: термоэластопласт.

7.2. Инструкция по применению.

8.1. Сандалеты, модель СДс-ДШ-К1-180

цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: полиуретан.

8.2. Инструкция по применению.

9.1. Сандалеты, модель СДс-ДШ-К1-180

цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: микропористая резина.

9.2. Инструкция по применению.

10.1. Сандалеты, модель СДс-ДШ-К1-185

цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: термоэластопласт.

10.2. Инструкция по применению.

11.1. Сандалеты, модель СДс-ДШ-К1-185

цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: полиуретан.

11.2. Инструкция по применению.

12.1. Сандалеты, модель СДс-ДШ-К1-185
цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: микропористая резина.

12.2. Инструкция по применению.

13.1. Сандалеты, модель СДс-ДШ-К1-190
цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: термоэластопласт.

13.2. Инструкция по применению.

14.1. Сандалеты, модель СДс-ДШ-К1-190
цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: полиуретан.

14.2. Инструкция по применению.

15.1. Сандалеты, модель СДс-ДШ-К1-190
цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: микропористая резина.

15.2. Инструкция по применению.

16.1. Сандалеты, модель СДс-ДШ-К1-195
цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: термоэластопласт.

16.2. Инструкция по применению.

17.1. Сандалеты, модель СДс-ДШ-К1-195
цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: полиуретан.

17.2. Инструкция по применению.

18.1. Сандалеты, модель СДс-ДШ-К1-195
цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: микропористая резина.

18.2. Инструкция по применению.

19.1. Сандалеты, модель СДс-ДШ-К1-200
цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: термоэластопласт.

19.2. Инструкция по применению.

20.1. Сандалеты, модель СДс-ДШ-К1-200
цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: полиуретан.

20.2. Инструкция по применению.

21.1. Сандалеты, модель СДс-ДШ-К1-200
цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: микропористая резина.

21.2. Инструкция по применению.

22.1. Полуботинки, модель ПБ-ДШ-К1-170
цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: термоэластопласт.

22.2. Инструкция по применению.

23.1. Полуботинки, модель ПБ-ДШ-К1-170
цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: полиуретан.

23.2. Инструкция по применению.

24.1. Полуботинки, модель ПБ-ДШ-К1-170
цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: микропористая резина.

- 24.2 Инструкция по применению.
- 25.1. Полуботинки, модель ПБ-ДШ-К1-175
цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: термоэластопласт.
- 25.2. Инструкция по применению.
- 26.1. Полуботинки, модель ПБ-ДШ-К1-175
цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: полиуретан.
- 26.2. Инструкция по применению.
- 27.1. Полуботинки, модель ПБ-ДШ-К1-175
цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: микропористая резина.
- 27.2 Инструкция по применению.
- 28.1. Полуботинки, модель ПБ-ДШ-К1-180
цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: термоэластопласт.
- 28.2. Инструкция по применению.
- 29.1. Полуботинки, модель ПБ-ДШ-К1-180
цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: полиуретан.
- 29.2. Инструкция по применению.
- 30.1. Полуботинки, модель ПБ-ДШ-К1-180
цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: микропористая резина.
- 30.2 Инструкция по применению.
- 31.1. Полуботинки, модель ПБ-ДШ-К1-185
цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: термоэластопласт.
- 31.2. Инструкция по применению.
- 32.1. Полуботинки, модель ПБ-ДШ-К1-185
цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: полиуретан.
- 32.2. Инструкция по применению.
- 33.1. Полуботинки, модель ПБ-ДШ-К1-185
цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: микропористая резина.
- 33.2. Инструкция по применению.
- 34.1. Полуботинки, модель ПБ-ДШ-К1-190
цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: термоэластопласт.
- 34.2. Инструкция по применению.
- 35.1. Полуботинки, модель ПБ-ДШ-К1-190
цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: полиуретан.
- 35.2. Инструкция по применению.
- 36.1. Полуботинки, модель ПБ-ДШ-К1-190
цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: микропористая резина.
- 36.2. Инструкция по применению.
- 37.1. Полуботинки, модель ПБ-ДШ-К1-195
цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: термоэластопласт.
- 37.2. Инструкция по применению.
- 38.1. Полуботинки, модель ПБ-ДШ-К1-195

цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: полиуретан.

38.2. Инструкция по применению.

39.1. Полуботинки, модель ПБ-ДШ-К1-195

цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: микропористая резина.

39.2. Инструкция по применению.

39.1. Полуботинки, модель ПБ-ДШ-К1-200

цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: термоэластопласт.

40.2. Инструкция по применению.

41.1. Полуботинки, модель ПБ-ДШ-К1-200

цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: полиуретан.

41.2. Инструкция по применению.

42.1. Полуботинки, модель ПБ-ДШ-К1-200

цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: микропористая резина.

42.2. Инструкция по применению.

III. Обувь ортопедическая сложная для школьников-мальчиков:

1.1. Туфли, модель Т-Шм-К1-205

цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: термоэластопласт.

1.2. Инструкция по применению.

2.1. Туфли, модель Т-Шм-К1-205

цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: полиуретан.

2.2. Инструкция по применению.

3.1. Туфли, модель Т-Шм-К1-205

цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: микропористая резина.

3.2. Инструкция по применению.

4.1. Туфли, модель Т-Шм-К1-210

цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: термоэластопласт.

4.2. Инструкция по применению.

5.1. Туфли, модель Т-Шм-К1-210

цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: полиуретан.

5.2. Инструкция по применению.

6.1. Туфли, модель Т-Шм-К1-210

цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: микропористая резина.

6.2. Инструкция по применению.

7.1. Туфли, модель Т-Шм-К1-215

цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: термоэластопласт.

7.2. Инструкция по применению.

8.1. Туфли, модель Т-Шм-К1-215

цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: полиуретан.

8.2. Инструкция по применению.

9.1. Туфли, модель Т-Шм-К1-215

цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: микропористая резина.

9.2. Инструкция по применению.

10.1 Туфли, модель Т-Шм-К1-220

цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: термоэластопласт.

10.2. Инструкция по применению.

11.1. Туфли, модель Т-Шм-К1-220

цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: полиуретан.

11.2. Инструкция по применению.

12.1. Туфли, модель Т-Шм-К1-220

цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: микропористая резина.

12.2. Инструкция по применению.

13.1. Туфли, модель Т-Шм-К1-225

цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: термоэластопласт.

13.2. Инструкция по применению.

14.1. Туфли, модель Т-Шм-К1-225

цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: полиуретан.

14.2. Инструкция по применению.

15.1. Туфли, модель Т-Шм-К1-225

цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: микропористая резина.

15.2. Инструкция по применению.

16.1 Туфли, модель Т-Шм-К1-230

цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: термоэластопласт.

16.2. Инструкция по применению.

17.1. Туфли, модель Т-Шм-К1-230

цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: полиуретан.

17.2. Инструкция по применению.

18.1. Туфли, модель Т-Шм-К1-230

цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: микропористая резина.

18.2. Инструкция по применению.

19.1. Туфли, модель Т-Шм-К1-235

цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: термоэластопласт.

19.2. Инструкция по применению.

20.1. Туфли, модель Т-Шм-К1-235

цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: полиуретан.

20.2. Инструкция по применению.

21.1. Туфли, модель Т-Шм-К1-235

цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: микропористая резина.

21.2. Инструкция по применению.

22.1. Туфли, модель Т-Шм-К1-240

цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: термоэластопласт.

22.2. Инструкция по применению.

23.1. Туфли, модель Т-Шм-К1-240

цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: полиуретан.

23.2. Инструкция по применению.

24.1. Туфли, модель Т-Шм-К1-240

цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: микропористая резина.

24.2. Инструкция по применению.

IV. Обувь ортопедическая сложная для школьников-девочек:

1.1. Туфли, модель Т-Щд-К1-205

цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: термоэластопласт.

1.2. Инструкция по применению.

2.1. Туфли, модель Т-Щд-К1-205

цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: полиуретан.

2.2. Инструкция по применению.

3.1. Туфли, модель Т-Щд-К1-205

цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: микропористая резина.

3.2. Инструкция по применению.

4.1. Туфли, модель Т-Щд-К1-210

цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: термоэластопласт.

4.2. Инструкция по применению.

5.1. Туфли, модель Т-Щд-К1-210

цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: полиуретан.

5.2. Инструкция по применению.

6.1. Туфли, модель Т-Щд-К1-210

цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: микропористая резина.

6.2. Инструкция по применению.

7.1. Туфли, модель Т-Щд-К1-215

цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: термоэластопласт.

7.2. Инструкция по применению.

8.1. Туфли, модель Т-Щд-К1-215

цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: полиуретан.

8.2. Инструкция по применению.

9.1. Туфли, модель Т-Щд-К1-215

цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: микропористая резина.

9.2. Инструкция по применению.

10.1 Туфли, модель Т-Щд-К1-220

цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: термоэластопласт.

10.2. Инструкция по применению.

11.1. Туфли, модель Т-Щд-К1-220

цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: полиуретан.

- 11.2. Инструкция по применению.
- 12.1. Туфли, модель Т-Шд-К1-220
цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: микропористая резина.
- 12.2. Инструкция по применению.
- 13.1. Туфли, модель Т-Шд-К1-225
цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: термоэластопласт.
- 13.2. Инструкция по применению.
- 14.1. Туфли, модель Т-Шд-К1-225
цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: полиуретан.
- 14.2. Инструкция по применению.
- 15.1. Туфли, модель Т-Шд-К1-225
цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: микропористая резина.
- 15.2. Инструкция по применению.
- 16.1 Туфли, модель Т-Шд-К1-230
цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: термоэластопласт.
- 16.2. Инструкция по применению.
- 17.1. Туфли, модель Т-Шд-К1-230
цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: полиуретан.
- 17.2. Инструкция по применению.
- 18.1. Туфли, модель Т-Шд-К1-230
цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: микропористая резина.
- 18.2. Инструкция по применению.
- 19.1. Туфли, модель Т-Шд-К1-235
цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: термоэластопласт.
- 19.2. Инструкция по применению.
- 20.1. Туфли, модель Т-Шд-К1-235
цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: полиуретан.
- 20.2. Инструкция по применению.
- 21.1. Туфли, модель Т-Шд-К1-235
цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: микропористая резина.
- 21.2. Инструкция по применению.

V. Обувь ортопедическая сложная подростковая мальчиковая:

- 1.1. Ботинки, модель Б-Пм-К4-245
цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: термоэластопласт.
- 1.2. Инструкция по применению.
- 2.1. Ботинки, модель Б-Пм-К4-245
цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: полиуретан.
- 2.2. Инструкция по применению.
- 3.1. Ботинки, модель Б-Пм-К4-245
цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: микропористая резина.

- 3.2. Инструкция по применению.
- 4.1. Ботинки, модель Б-Пм-К4-250
цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: термоэластопласт.
- 4.2. Инструкция по применению.
- 5.1. Ботинки, модель Б-Пм-К4-250
цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: полиуретан.
- 5.2. Инструкция по применению.
- 6.1. Ботинки, модель Б-Пм-К4-250
цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: микропористая резина.
- 6.2. Инструкция по применению.
- 7.1. Ботинки, модель Б-Пм-К4-255
цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: термоэластопласт.
- 7.2. Инструкция по применению.
- 8.1. Ботинки, модель Б-Пм-К4-255
цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: полиуретан.
- 8.2. Инструкция по применению.
- 9.1. Ботинки, модель Б-Пм-К4-255
цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: микропористая резина.
- 9.2. Инструкция по применению.
- 10.1 Ботинки, модель Б-Пм-К4-260
цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: термоэластопласт.
- 10.2. Инструкция по применению.
- 11.1. Ботинки, модель Б-Пм-К4-260
цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: полиуретан.
- 11.2. Инструкция по применению.
- 12.1. Ботинки, модель Б-Пм-К4-260
цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: микропористая резина.
- 12.2. Инструкция по применению.
- 13.1. Ботинки, модель Б-Пм-К4-265
цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: термоэластопласт.
- 13.2. Инструкция по применению.
- 14.1. Ботинки, модель Б-Пм-К4-265
цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: полиуретан.
- 14.2. Инструкция по применению.
- 15.1. Ботинки, модель Б-Пм-К4-265
цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: микропористая резина.
- 15.2. Инструкция по применению.
- 16.1 Ботинки, модель Б-Пм-К4-270
цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: термоэластопласт.
- 16.2. Инструкция по применению.
- 17.1. Ботинки, модель Б-Пм-К4-270

- цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: полиуретан.
- 17.2. Инструкция по применению.
- 18.1. Ботинки, модель Б-Пм-К4-270
цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: микропористая резина.
- 18.2. Инструкция по применению.
- 19.1. Ботинки, модель Б-Пм-К4-275
цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: термоэластопласт.
- 19.2. Инструкция по применению.
- 20.1. Ботинки, модель Б-Пм-К4-275
цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: полиуретан.
- 20.2. Инструкция по применению.
- 21.1. Ботинки, модель Б-Пм-К4-275
цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: микропористая резина.
- 21.2. Инструкция по применению.
- 22.1. Ботинки, модель Б-Пм-К4-280
цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: термоэластопласт.
- 22.2. Инструкция по применению.
- 23.1. Ботинки, модель Б-Пм-К4-280
цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: полиуретан.
- 23.2. Инструкция по применению.
- 24.1. Ботинки, модель Б-Пм-К4-280
цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: микропористая резина.
- 24.2. Инструкция по применению.

VI. Обувь ортопедическая сложная подростковая девичья:

- 1.1. Сандалеты, модель СДв-Пд-К(Н)1-225
цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: термоэластопласт.
- 1.2. Инструкция по применению.
- 2.1. Сандалеты, модель СДв-Пд-К(Н)1-225
цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: полиуретан.
- 2.2. Инструкция по применению.
- 3.1. Сандалеты, модель СДв-Пд-К(Н)1-225
цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: микропористая резина.
- 3.2. Инструкция по применению.
- 4.1. Сандалеты, модель СДв-Пд-К(Н)1-230
цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: термоэластопласт.
- 4.2. Инструкция по применению.
- 5.1. Сандалеты, модель СДв-Пд-К(Н)1-230
цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: полиуретан.
- 5.2. Инструкция по применению.
- 6.1. Сандалеты, модель СДв-Пд-К(Н)1-230

- цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: микропористая резина.
- 6.2. Инструкция по применению.
- 7.1. Сандалеты, модель СДв-Пд-К(Н)1-235
цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: термоэластопласт.
- 7.2. Инструкция по применению.
- 8.1. Сандалеты, модель СДв-Пд-К(Н)1-235
цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: полиуретан.
- 8.2. Инструкция по применению.
- 9.1. Сандалеты, модель СДв-Пд-К(Н)1-235
цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: микропористая резина.
- 9.2. Инструкция по применению.
- 10.1 Сандалеты, модель СДв-Пд-К(Н)1-240
цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: термоэластопласт.
- 10.2. Инструкция по применению.
- 11.1. Сандалеты, модель СДв-Пд-К(Н)1-240
цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: полиуретан.
- 11.2. Инструкция по применению.
- 12.1. Сандалеты, модель СДв-Пд-К(Н)1-240
цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: микропористая резина.
- 12.2. Инструкция по применению.
- 13.1. Сандалеты, модель СДв-Пд-К(Н)1-245
цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: термоэластопласт.
- 13.2. Инструкция по применению.
- 14.1. Сандалеты, модель СДв-Пд-К(Н)1-245
цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: полиуретан.
- 14.2. Инструкция по применению.
- 15.1. Сандалеты, модель СДв-Пд-К(Н)1-245
цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: микропористая резина.
- 15.2. Инструкция по применению.
- 16.1 Сандалеты, модель СДв-Пд-К(Н)1-250
цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: термоэластопласт.
- 16.2. Инструкция по применению.
- 17.1. Сандалеты, модель СДв-Пд-К(Н)1-250
цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: полиуретан.
- 17.2. Инструкция по применению.
- 18.1. Сандалеты, модель СДв-Пд-К(Н)1-250
цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: микропористая резина.
- 18.2. Инструкция по применению.
- 19.1. Сандалеты, модель СДв-Пд-К(Н)1-255
цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: термоэластопласт.

- 19.2. Инструкция по применению.
- 20.1. Сандалеты, модель СДв-Пд-К(Н)1-255
цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: полиуретан.
- 20.2. Инструкция по применению.
- 21.1. Сандалеты, модель СДв-Пд-К(Н)1-255
цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: микропористая резина.
- 21.2. Инструкция по применению.

VII. Обувь ортопедическая сложная мужская:

- 1.1. Туфли, модель Т-М-К1-245
цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: термоэластопласт.
- 1.2. Инструкция по применению.
- 2.1. Туфли, модель Т-М-К1-245
цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: полиуретан.
- 2.2. Инструкция по применению.
- 3.1. Туфли, модель Т-М-К1-245
цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: микропористая резина.
- 3.2. Инструкция по применению.
- 4.1. Туфли, модель Т-М-К1-250
цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: термоэластопласт.
- 4.2. Инструкция по применению.
- 5.1. Туфли, модель Т-М-К1-250
цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: полиуретан.
- 5.2. Инструкция по применению.
- 6.1. Туфли, модель Т-М-К1-250
цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: микропористая резина.
- 6.2. Инструкция по применению.
- 7.1. Туфли, модель Т-М-К1-255
цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: термоэластопласт.
- 7.2. Инструкция по применению.
- 8.1. Туфли, модель Т-М-К1-255
цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: полиуретан.
- 8.2. Инструкция по применению.
- 9.1. Туфли, модель Т-М-К1-255
цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: микропористая резина.
- 9.2. Инструкция по применению.
- 10.1. Туфли, модель Т-М-К1-260
цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: термоэластопласт.
- 10.2. Инструкция по применению.
- 11.1. Туфли, модель Т-М-К1-260
цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: полиуретан.

- 11.2. Инструкция по применению.
- 12.1. Туфли, модель Т-М-К1-260
цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: микропористая резина.
- 12.2. Инструкция по применению.
- 13.1. Туфли, модель Т-М-К1-265
цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: термоэластопласт.
- 13.2. Инструкция по применению.
- 14.1. Туфли, модель Т-М-К1-265
цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: полиуретан.
- 14.2. Инструкция по применению.
- 15.1. Туфли, модель Т-М-К1-265
цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: микропористая резина.
- 15.2. Инструкция по применению.
- 16.1 Туфли, модель Т-М-К1-270
цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: термоэластопласт.
- 16.2. Инструкция по применению.
- 17.1. Туфли, модель Т-М-К1-270
цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: полиуретан.
- 17.2. Инструкция по применению.
- 18.1. Туфли, модель Т-М-К1-270
цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: микропористая резина.
- 18.2. Инструкция по применению.
- 19.1. Туфли, модель Т-М-К1-275
цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: термоэластопласт.
- 19.2. Инструкция по применению.
- 20.1. Туфли, модель Т-М-К1-275
цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: полиуретан.
- 20.2. Инструкция по применению.
- 21.1. Туфли, модель Т-М-К1-275
цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: микропористая резина.
- 21.2. Инструкция по применению.
- 22.1. Туфли, модель Т-М-К1-280
цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: термоэластопласт.
- 22.2. Инструкция по применению.
- 23.1. Туфли, модель Т-М-К1-280
цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: полиуретан.
- 23.2. Инструкция по применению.
- 24.1. Туфли, модель Т-М-К1-280
цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: микропористая резина.
- 24.2. Инструкция по применению.
- 25.1. Туфли, модель Т-М-К1-285

- цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: термоэластопласт.
- 25.2. Инструкция по применению.
- 26.1. Туфли, модель Т-М-К1-285
цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: полиуретан.
- 26.2. Инструкция по применению.
- 27.1. Туфли, модель Т-М-К1-285
цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: микропористая резина.
- 27.2. Инструкция по применению.
- 28.1. Туфли, модель Т-М-К1-290
цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: термоэластопласт.
- 28.2. Инструкция по применению.
- 29.1. Туфли, модель Т-М-К1-290
цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: полиуретан.
- 29.2. Инструкция по применению.
- 30.1. Туфли, модель Т-М-К1-290
цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: микропористая резина.
- 30.2. Инструкция по применению.
- 31.1. Туфли, модель Т-М-К1-295
цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: термоэластопласт.
- 31.2. Инструкция по применению.
- 32.1. Туфли, модель Т-М-К1-295
цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: полиуретан.
- 32.2. Инструкция по применению.
- 33.1. Туфли, модель Т-М-К1-295
цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: микропористая резина.
- 33.2. Инструкция по применению.
- 34.1. Туфли, модель Т-М-К1-300
цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: термоэластопласт.
- 34.2. Инструкция по применению.
- 35.1. Туфли, модель Т-М-К1-300
цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: полиуретан.
- 35.2. Инструкция по применению.
- 36.1. Туфли, модель Т-М-К1-300
цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: микропористая резина.
- 36.2. Инструкция по применению.
- 37.1. Туфли, модель Т-М-К1-305
цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: термоэластопласт.
- 37.2. Инструкция по применению.
- 38.1. Туфли, модель Т-М-К1-305
цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: полиуретан.

- 38.2. Инструкция по применению.
- 39.1. Туфли, модель Т-М-К1-305
цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: микропористая резина.
- 39.2. Инструкция по применению.
- 40.1. Ботинки, модель Б-М-К2-245
цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: термоэластопласт.
- 40.2. Инструкция по применению.
- 41.1. Ботинки, модель Б-М-К2-245
цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: полиуретан.
- 41.2. Инструкция по применению.
- 42.1. Ботинки, модель Б-М-К2-245
цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: микропористая резина.
- 42.2. Инструкция по применению.
- 43.1. Ботинки, модель Б-М-К2-250
цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: термоэластопласт.
- 43.2. Инструкция по применению.
- 44.1. Ботинки, модель Б-М-К2-250
цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: полиуретан.
- 44.2. Инструкция по применению.
- 45.1. Ботинки, модель Б-М-К2-250
цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: микропористая резина.
- 45.2. Инструкция по применению.
- 46.1. Ботинки, модель Б-М-К2-255
цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: термоэластопласт.
- 46.2. Инструкция по применению.
- 47.1. Ботинки, модель Б-М-К2-255
цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: полиуретан.
- 47.2. Инструкция по применению.
- 48.1. Ботинки, модель Б-М-К2-255
цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: микропористая резина.
- 48.2. Инструкция по применению.
- 49.1. Ботинки, модель Б-М-К2-260
цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: термоэластопласт.
- 49.2. Инструкция по применению.
- 50.1. Ботинки, модель Б-М-К2-260
цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: полиуретан.
- 50.2. Инструкция по применению.
- 51.1. Ботинки, модель Б-М-К2-260
цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: микропористая резина.
- 51.2. Инструкция по применению.
- 52.1. Ботинки, модель Б-М-К2-265

- цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: термоэластопласт.
- 52.2. Инструкция по применению.
- 53.1. Ботинки, модель Б-М-К2-265
цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: полиуретан.
- 53.2. Инструкция по применению.
- 54.1. Ботинки, модель Б-М-К2-265
цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: микропористая резина.
- 54.2. Инструкция по применению.
- 55.1 Ботинки, модель Б-М-К2-270
цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: термоэластопласт.
- 55.2. Инструкция по применению.
- 56.1. Ботинки, модель Б-М-К2-270
цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: полиуретан.
- 56.2. Инструкция по применению.
- 57.1. Ботинки, модель Б-М-К2-270
цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: микропористая резина.
- 57.2. Инструкция по применению.
- 58.1. Ботинки, модель Б-М-К2-275
цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: термоэластопласт.
- 58.2. Инструкция по применению.
- 59.1. Ботинки, модель Б-М-К2-275
цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: полиуретан.
- 59.2. Инструкция по применению.
- 60.1. Ботинки, модель Б-М-К2-275
цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: микропористая резина.
- 60.2. Инструкция по применению.
- 61.1. Ботинки, модель Б-М-К2-280
цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: термоэластопласт.
- 61.2. Инструкция по применению.
- 62.1. Ботинки, модель Б-М-К2-280
цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: полиуретан.
- 62.2. Инструкция по применению.
- 63.1. Ботинки, модель Б-М-К2-280
цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: микропористая резина.
- 63.2. Инструкция по применению.
- 64.1. Ботинки, модель Б-М-К2-285
цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: термоэластопласт.
- 64.2. Инструкция по применению.
- 65.1. Ботинки, модель Б-М-К2-285
цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: полиуретан.

- 65.2. Инструкция по применению.
- 66.1. Ботинки, модель Б-М-К2-285
цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: микропористая резина.
- 66.2. Инструкция по применению.
- 67.1. Ботинки, модель Б-М-К2-290
цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: термоэластопласт.
- 67.2. Инструкция по применению.
- 68.1. Ботинки, модель Б-М-К2-290
цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: полиуретан.
- 68.2. Инструкция по применению.
- 69.1. Ботинки, модель Б-М-К2-290
цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: микропористая резина.
- 69.2. Инструкция по применению.
- 70.1. Ботинки, модель Б-М-К2-295
цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: термоэластопласт.
- 70.2. Инструкция по применению.
- 71.1. Ботинки, модель Б-М-К2-295
цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: полиуретан.
- 71.2. Инструкция по применению.
- 72.1. Ботинки, модель Б-М-К2-295
цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: микропористая резина.
- 72.2. Инструкция по применению.
- 73.1. Ботинки, модель Б-М-К2-300
цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: термоэластопласт.
- 73.2. Инструкция по применению.
- 74.1. Ботинки, модель Б-М-К2-300
цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: полиуретан.
- 74.2. Инструкция по применению.
- 75.1. Ботинки, модель Б-М-К2-300
цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: микропористая резина.
- 75.2. Инструкция по применению.
- 76.1. Ботинки, модель Б-М-К2-305
цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: термоэластопласт.
- 76.2. Инструкция по применению.
- 77.1. Ботинки, модель Б-М-К2-305
цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: полиуретан.
- 77.2. Инструкция по применению.
- 78.1. Ботинки, модель Б-М-К2-305
цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: микропористая резина.
- 78.2. Инструкция по применению.

VIII. Обувь ортопедическая сложная женская:

- 1.1. Ботинки, модель Б-Ж-К(Н)2-210
цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: термоэластопласт.
- 1.2. Инструкция по применению.
- 2.1. Ботинки, модель Б-Ж-К(Н)2-210
цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: полиуретан.
- 2.2. Инструкция по применению.
- 3.1. Ботинки, модель Б-Ж-К(Н)2-210
цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: микропористая резина.
- 3.2. Инструкция по применению.
- 4.1. Ботинки, модель Б-Ж-К(Н)2-215
цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: термоэластопласт.
- 4.2. Инструкция по применению.
- 5.1. Ботинки, модель Б-Ж-К(Н)2-215
цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: полиуретан.
- 5.2. Инструкция по применению.
- 6.1. Ботинки, модель Б-Ж-К(Н)2-215
цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: микропористая резина.
- 6.2. Инструкция по применению.
- 7.1. Ботинки, модель Б-Ж-К(Н)2-220
цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: термоэластопласт.
- 7.2. Инструкция по применению.
- 8.1. Ботинки, модель Б-Ж-К(Н)2-220
цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: полиуретан.
- 8.2. Инструкция по применению.
- 9.1. Ботинки, модель Б-Ж-К(Н)2-220
цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: микропористая резина.
- 9.2. Инструкция по применению.
- 10.1. Ботинки, модель Б-Ж-К(Н)2-225
цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: термоэластопласт.
- 10.2. Инструкция по применению.
- 11.1. Ботинки, модель Б-Ж-К(Н)2-225
цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: полиуретан.
- 11.2. Инструкция по применению.
- 12.1. Ботинки, модель Б-Ж-К(Н)2-225
цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: микропористая резина.
- 12.2. Инструкция по применению.
- 13.1. Ботинки, модель Б-Ж-К(Н)2-230
цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: термоэластопласт.
- 13.2. Инструкция по применению.
- 14.1. Ботинки, модель Б-Ж-К(Н)2-230

- цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: полиуретан.
- 14.2. Инструкция по применению.
- 15.1. Ботинки, модель Б-Ж-К(Н)2-230
цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: микропористая резина.
- 15.2. Инструкция по применению.
- 16.1 Ботинки, модель Б-Ж-К(Н)2-235
цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: термоэластопласт.
- 16.2. Инструкция по применению.
- 17.1. Ботинки, модель Б-Ж-К(Н)2-235
цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: полиуретан.
- 17.2. Инструкция по применению.
- 18.1. Ботинки, модель Б-Ж-К(Н)2-235
цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: микропористая резина.
- 18.2. Инструкция по применению.
- 19.1. Ботинки, модель Б-Ж-К(Н)2-240
цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: термоэластопласт.
- 19.2. Инструкция по применению.
- 20.1. Ботинки, модель Б-Ж-К(Н)2-240
цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: полиуретан.
- 20.2. Инструкция по применению.
- 21.1. Ботинки, модель Б-Ж-К(Н)2-240
цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: микропористая резина.
- 21.2. Инструкция по применению.
- 22.1. Ботинки, модель Б-Ж-К(Н)2-245
цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: термоэластопласт.
- 22.2. Инструкция по применению.
- 23.1. Ботинки, модель Б-Ж-К(Н)2-245
цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: полиуретан.
- 23.2. Инструкция по применению.
- 24.1. Ботинки, модель Б-Ж-К(Н)2-245
цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: микропористая резина.
- 24.2. Инструкция по применению.
- 25.1. Ботинки, модель Б-Ж-К(Н)2-250
цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: термоэластопласт.
- 25.2. Инструкция по применению.
- 26.1. Ботинки, модель Б-Ж-К(Н)2-250
цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: полиуретан.
- 26.2. Инструкция по применению.
- 27.1. Ботинки, модель Б-Ж-К(Н)2-250
цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: микропористая резина.

- 27.2. Инструкция по применению.
- 28.1. Ботинки, модель Б-Ж-К(Н)2-255
цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: термоэластопласт.
- 28.2. Инструкция по применению.
- 29.1. Ботинки, модель Б-Ж-К(Н)2-255
цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: полиуретан.
- 29.2. Инструкция по применению.
- 30.1. Ботинки, модель Б-Ж-К(Н)2-255
цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: микропористая резина.
- 30.2. Инструкция по применению.
- 31.1. Ботинки, модель Б-Ж-К(Н)2-260
цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: термоэластопласт.
- 31.2. Инструкция по применению.
- 32.1. Ботинки, модель Б-Ж-К(Н)2-260
цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: полиуретан.
- 32.2. Инструкция по применению.
- 33.1. Ботинки, модель Б-Ж-К(Н)2-260
цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: микропористая резина.
- 33.2. Инструкция по применению.
- 34.1. Ботинки, модель Б-Ж-К(Н)2-265
цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: термоэластопласт.
- 34.2. Инструкция по применению.
- 35.1. Ботинки, модель Б-Ж-К(Н)2-265
цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: полиуретан.
- 35.2. Инструкция по применению.
- 36.1. Ботинки, модель Б-Ж-К(Н)2-265
цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: микропористая резина.
- 36.2. Инструкция по применению.
- 37.1 Ботинки, модель Б-Ж-К(Н)2-270
цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: термоэластопласт.
- 37.2. Инструкция по применению.
- 38.1. Ботинки, модель Б-Ж-К(Н)2-270
цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: полиуретан.
- 38.2. Инструкция по применению.
- 39.1. Ботинки, модель Б-Ж-К(Н)2-270
цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: микропористая резина.
- 39.2. Инструкция по применению.
- 40.1. Ботинки, модель Б-Ж-К(Н)2-275
цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: термоэластопласт.
- 40.2. Инструкция по применению.
- 41.1. Ботинки, модель Б-Ж-К(Н)2-275

цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: полиуретан.

41.2. Инструкция по применению.

42.1. Ботинки, модель Б-Ж-К(Н)2-275

цвет: черный, белый, бежевый, красный, синий, коричневый
материал подошвы: микропористая резина.

42.2. Инструкция по применению.

Разработчик: Общество с ограниченной ответственностью «Орто Кубань-Юг»;
350047, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, проезд 3-й линии, д. 4.

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «Орто Кубань-Юг»;
350047, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, проезд 3-й линии, д. 4.

Место производства медицинского изделия:

350047, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, проезд 3-й линии, д. 4.

Организация в РФ, уполномоченная производителем на принятие и удовлетворение требований от потребителей в отношении товара ненадлежащего качества

Общество с ограниченной ответственностью «Орто Кубань-Юг» (ООО «Орто Кубань-Юг»)

Адрес: 350047, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, проезд 3-й линии, д. 4,
телефон +7 (861) 222-58-96, +7 (918) 162-50-46, адрес электронной почты: ksp_123@mail.ru

2. Краткие сведения о медицинском изделии

Назначение

Обувь ортопедическая сложная по ТУ 32.50.22-001-26410155-2021, варианты исполнения (далее *Обувь*), выпускаемая серийно, предназначена для детей, подростков и взрослых с деформациями и дефектами стоп, в том числе обусловленные сосудистыми заболеваниями нижних конечностей, а также вызванных сахарным диабетом с целью поддержки, выравнивания, компенсации или коррекции деформаций стоп, улучшения их функции и/или осанки.

Область применения и потенциальные потребители

Область применения – ортопедия и смежные области (травматология, педиатрия, эндокринология), заболевания из которых сопровождаются деформациями и дефектами стоп (голеней).

Обувь применяется для повседневного (летняя, зимняя, весенне-осенняя, кругло-сезонная) и домашнего ношения пациентами, которым назначена коррекция нарушений.

Потенциальные потребители – дети, подростки и взрослые с деформациями и дефектами стоп.

Показания к применению

Обувь ортопедическая сложная малолетская, дошкольная, для школьников-мальчиков и школьников-девочек:

- при плоской стопе (при низком своде стопы);
- при нефиксированной эквиноварусной (вальгусной) деформации стопы, нестабильности голеностопного сустава;
- при плосковальгусной деформации стоп(-ы);
- на паралитическую стопу (в т.ч. при последствиях детского церебрального паралича (ДЦП));
- при приведении переднего отдела стопы.

Обувь ортопедическая сложная подростковая мальчиковая:

- при плоскостопии (при низком своде стопы);
- при поллой стопе;
- на паралитическую стопу (в т.ч. при последствиях детского церебрального паралича (ДЦП));

- при пяточной шпоре;
- при плоско-вальгусной стопе.

Обувь ортопедическая сложная подростковая девичья:

- при плоскостопии (при низком своде стопы);
- при поллой стопе;
- на паралитическую стопу (в т.ч. при последствиях детского церебрального паралича (ДЦП));
- при плоско-вальгусной стопе.
- при диабетической стопе.

Обувь ортопедическая сложная мужская (туфли):

- при плоскостопии (при низком своде стопы);
- при поллой стопе;
- при пяточной шпоре;
- при плоско-вальгусной стопе.

Обувь ортопедическая сложная мужская (ботинки):

- при плоскостопии (при низком своде стопы);
- при поллой стопе;
- при пяточной шпоре;
- при плоско-вальгусной стопе.
- при диабетической стопе.

Обувь ортопедическая сложная женская:

- при плоскостопии (при низком своде стопы);
- при поллой стопе;
- при плоско-вальгусной стопе.
- при диабетической стопе.

Противопоказания

Абсолютные:

- тяжелая хроническая сердечно-сосудистая патология у пациентов с низким уровнем двигательной активности;
- тяжелые поражения нервно-мышечного аппарата различной этиологии (параличи, парезы, миодистрофии, миодистонии);
- обширные трофические язвы стопы, гангрена, распространенные гнойные процессы в мягких тканях;
- отсутствие опороспособности нижней конечности из-за обширного рубцового изменения ткани, склонной к изъязвлению;
- аллергические реакции на материалы ортопедического изделия.

Относительные:

- выраженное ограничение двигательной активности у лиц старческого возраста;
- ограниченные трофические язвы на стопе или локальный участок остеомиелитического поражения костной ткани;
- нарушение опороспособности нижних конечностей при выраженных деформациях или культих стоп, не подлежащих хирургической коррекции.

Временные:

- острая сердечно-сосудистая патология;
- выраженные деформации стопы и дефекты кожных покровов в период хирургической подготовки к ортопедическому обеспечению и на ближайший послеоперационный период, на период консервативного лечения заболевания, вызвавшего деформацию стопы.

Возможные побочные действия

- мозоли;

- потертости кожных покровов;
- аллергические реакции на материалы обуви.

Возможные осложнения

- прогрессирование деформации и дефектов стоп (голеней) при неправильно подобранной обуви;
- развитие гнойно-воспалительных заболеваний мягких тканей нижних конечностей при условии инфицирования потертостей и мозолей на стопах.

Классификация медицинского изделия

Класс в зависимости от степени потенциального риска применения обуви в медицинских целях – 1 по ГОСТ 31508.

Данное изделие является нестерильным и предназначено для кратковременного использования (менее 24 ч) одним пациентом.

Класс опасности медицинских отходов – А (эпидемиологически безопасные отходы).

3. Краткая характеристики изделия

Варианты исполнения обуви по половозрастным группам, виду и размеру обуви (метрический и штихмассовый) приведены в табл. 1 (по ГОСТ 11373).

Таблица 1

Половозрастная группа обуви	Вид обуви	Размеры, мм	Размер штихмассовый
Обувь ортопедическая сложная малодетская (МД)	Сандалеты (СДс)	145-150-155-160-165	23-24-25-25,5-26
Обувь ортопедическая сложная дошкольная (ДШ)	Сандалеты (СДс) Полуботинки (ПБ)	170-175-180-185-190-195-200	27-28-28,5-29-30-31-31,5
Обувь ортопедическая сложная для школьников-мальчиков (Шм)	Туфли (Т)	205-210-215-220-225-230-235-240	32-33-34-34,5-35-36-37-37,5
Обувь ортопедическая сложная для школьников-девочек (Шд)	Туфли (Т)	205-210-215-220-225-230-235	32-33-34-34,5-35-36-37
Обувь ортопедическая сложная подростковая мальчиковая (Пм)	Ботинки (Б)	245-250-255-260-265-270-275-280	38-39-40-40,5-41-42-43-43,5
Обувь ортопедическая сложная подростковая девичья (Пд)	Сандалеты (СДв) Ботинки (Б)	225-230-235-240-245-250-255	35-36-37-37,5-38-39-40
Обувь ортопедическая сложная мужская (М)	Туфли (Т) Ботинки (Б)	245-250-255-260-265-270-275-280-285-290-295-300-305	38-39-40-40,5-41-42-43-43,5-44-45-46-46,5-47
Обувь ортопедическая сложная женская (Ж)	Ботинки (Б)	210-215-220-225-230-235-240-245-250-255-260-265-270-275	33-34-34,5-35-36-37-37,5-38,5-39-40-40,5-41-42-43

Расшифровка аббревиатур:

Модели:

- СДс – сандалеты средний борец;
- СДв – сандалеты высокий борец;
- Т – туфли;
- ПБ – полуботинки;
- Б – ботинки.

Половозрастные группы:

- МД – малодетская;
- ДШ – дошкольная;
- Шм и Шд – школьная (для мальчиков и девочек);
- Пм и Пд – подростковая (мальчиковая и девичья);
- Ж – женская;
- М – мужская.

Материал верха:

- К – кожа;
- Н – нубук.

Материал подкладки:

- 1 – кожа;
- 2 – натуральный мех;
- 3 – искусственный мех;
- 4 – байка.

Обувь ортопедическая сложная по ТУ 32.50.22-001-26410155-2021 соответствует требованиям, изложенными в ГОСТ Р 54407-2020 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия».

Обувь ортопедическая сложная имеет не менее двух специальных ортопедических деталей и изготовлена по обувной ортопедической колодке (ГОСТ Р 53800).

В обуви присутствуют жесткие специальные ортопедические детали: жесткий задник, который предназначен для удержания пяточной кости в функционально выгодном положении за счет воздействия на подтаранный сустав и задний жесткий берц, фиксирующий и удерживающий голеностопный сустав. В обуви используются стельки ортопедические по ТУ 32.50.22-001-0117691259-2019 (регистрационное удостоверение РЗН 2020/12633 от 16.03.2022 г. «Стельки и полустельки ортопедические по ТУ 32.50.22-001-0117691259-2019»).

Габаритные размеры и масса обуви приведены в таблицах 2-5.



Рис. 1. Схема обозначения размеров сандалета (L – длина, h – высота сандалеты, h_1 – высота заднего жесткого берца, h_2 – высота задника).

Таблица 2

Половозрастная группа обуви	Размеры, мм (по ГОСТ 11373)	Вид обуви – Сандалеты (СД)				
		Размеры (мм)				Масса полупары (г), не более
		$L \pm 1,5$	h , не менее	$h_1 \pm 0,5$	$h_2 \pm 0,5$	
Обувь ортопедическая сложная малолетская (СДс-МД)	145	165	92	72	28,0	160
	150	176	94	73	30,0	170
	155	185	96	74	32,0	175
	160	193	98	76	34,0	185
	165	199	100	78	36,0	195
Обувь ортопедическая сложная дошкольная (СДс-ДШ)	170	190	102	78	30,0	220
	175	196	104	79	32,0	230
	180	207	106	81	34,0	240
	185	211	108	83	36,0	245
	190	214	110	85	38,0	248
	195	220	112	86	40,0	257
Обувь ортопедическая сложная подростковая девичья (СДв-Пд)	200	225	114	87	42,0	265
	225	252	141	109	40,0	370
	230	259	143	110	42,0	385
	235	265	145	112	44,0	400
	240	270	147	114	46,0	412
	245	278	149	115	48,0	420
	250	284	151	117	50,0	428
	255	293	153	118	52,0	445

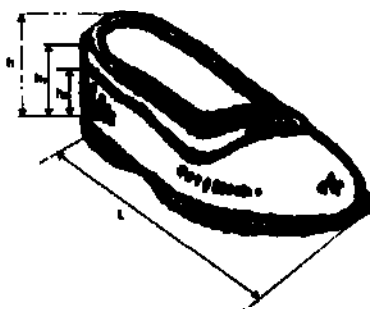


Рис. 2. Схема обозначения размеров туфель (L – длина, h – высота туфли, h₁ – высота заднего жесткого берца, h₂ – высота задника).

Таблица 3

Половозрастная группа обуви	Размеры, мм (по ГОСТ 11373)	Вид обуви – Туфли (СД)				
		Размеры (мм)				Масса полупары (г), не более
		L ± 1,5	h, не менее	h ₁ ± 0,5	h ₂ ± 0,5	
Обувь ортопедическая сложная для школьников-мальчиков (Т-Шм)	205	236	127	71	32,0	340
	210	243	128	72	34,0	350
	215	249	129	73	36,0	358
	220	252	130	75	38,0	362
	225	256	131	76	40,0	369
	230	260	132	78	42,0	375
	235	267	133	79	44,0	385
	240	273	134	81	46,0	395
Обувь ортопедическая сложная для школьников-девочек (Т-Шд)	205	232	102	75	34,0	334
	210	237	103	76	36,0	341
	215	240	104	77	38,0	355
	220	245	105	78	40,0	362
	225	250	106	78	42,0	370
	230	257	107	79	44,0	384
	235	263	108	80	46,0	398
Обувь ортопедическая сложная мужская (Т-М)	245	276	66	45,0	38,0	375
	250	282	67	45,5	40,0	380
	255	284	68	46,0	44,0	385
	265	290	69	46,5	46,0	394
	270	297	70	47,0	48,0	405
	275	303	71	47,5	50,0	412
	285	310	72	48,0	52,0	421
	290	317	73	48,5	54,0	430
	295	323	74	49,0	56,0	440
	305	330	75	49,5	58,0	450

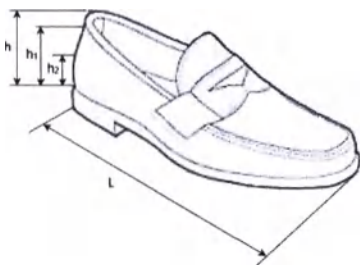


Рис. 3. Схема обозначения размеров полуботинок (L – длина, h – высота полуботинки, h₁ – высота заднего жесткого берца, h₂ – высота задника).

Таблица 4

Половозрастная группа обуви	Размеры, мм (по ГОСТ 11373)	Вид обуви – Полуботинки (ПБ)				
		Размеры (мм)				Масса полупары (г), не более
		L ± 1,5	h, не менее	h ₁ ± 0,5	h ₂ ± 0,5	
Обувь ортопедическая сложная дошкольная (ДШ)	170	190	77	57	30,0	245
	175	196	78	58	32,0	252
	180	203	79	59	34,0	260
	185	210	80	60	36,0	270
	190	216	81	61	38,0	278
	195	222	82	62	40,0	286
	200	228	83	63	42,0	294

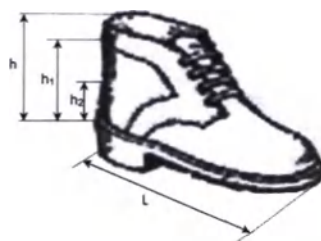


Рис. 4. Схема обозначения размеров ботинок (L – длина, h – высота ботинка, h₁ – высота заднего жесткого берца, h₂ – высота задника).

Таблица 5

Половозрастная группа обуви	Размеры, мм (по ГОСТ 11373)	Вид обуви – Ботинки (Б)				
		Размеры (мм)				Масса полупары (г), не более
		L ± 1,5	h, не менее	h ₁ ± 0,4	h ₂ ± 0,5	
Обувь ортопедическая сложная подростковая мальчиковая (Пм)	245	271	120	59	40,0	341
	250	276	122	60	42,0	346
	255	282	124	61	44,0	351
	260	284	126	63	46,0	357
	265	290	128	65	48,0	365
	270	297	130	67	50,0	374
	275	303	132	69	52,0	382
	280	310	134	70	54,0	391
Обувь ортопедическая сложная мужская (М)	245	276	122	58	38,0	560
	250	279	124	59	40,0	565
	255	282	126	60	42,0	570
	260	285	128	61	44,0	578
	265	290	130	63	46,0	588
	270	310	132	65	48,0	630
	275	315	134	67	50,0	640
	280	321	136	69	52,0	650
	285	328	138	71	54,0	665
	290	334	140	73	56,0	678
	295	341	142	73	58,0	692
	300	345	144	74	60,0	700
	305	352	146	75	62,0	714
Обувь ортопедическая сложная женская (Ж)	210	217	144	73	32,0	384
	215	223	146	74	34,0	394
	220	229	148	75	36,0	405
	225	235	150	75	38,0	416
	230	241	152	76	40,0	426
	235	254	154	78	42,0	450
	240	261	156	80	44,0	462
	245	268	158	81	46,0	474
	250	275	160	83	48,0	486
	255	283	162	84	50,0	500
	260	291	164	85	52,0	515
	265	300	166	87	54,0	530
	270	308	168	88	56,0	545
	275	316	170	89	58,0	560

Варианты исполнения, габаритные размеры и масса стелек (регистрационное удостоверение № РЗН 2020/12633 от 16.03.2022 г. «Стельки и полустельки ортопедические по ТУ 32.50.22-001-0117691259-2019») приведены в табл. 6.

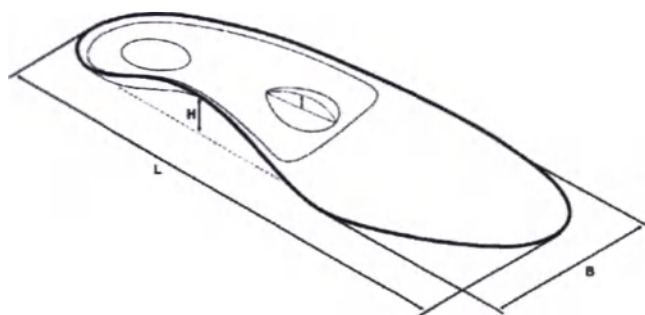


Рис. 5. Стелька ортопедическая.

Таблица 6

Наименование и назначение стельки	Обозначение ¹	Половозрастная группа ² – малодетская			
		Размеры (мм)			Масса (г), не более (1 шт.)
		L ± 1,5 (по ГОСТ 11373)	B ± 0,5	H не менее	
Стельки каркасные при плоскостопии (при низком своде стопы)	ОС-Д-1К	145	62	20	24
		150	63	21	25
		155	65,5	22,5	26
	ОС-Д-1КЧ	160	68	24	27
		165	69,5	24	28
Стельки каркасные при приведении переднего отдела стопы	ОС-Д-1КПОС	145	62	20	28
		150	63	21	29
		155	65,5	22,5	30
		160	68	24	31
		165	69,5	24	32
Стельки каркасные при плоско-вальгусной деформации стопы	ОС-Д-1КПВДС	145	62	20	29
		150	63	21	30
		155	65,5	22,5	31
		160	68	24	32
		165	69,5	24	33
Стельки бескаркасные при плоскостопии (при низком своде стопы)	ОС-Д-1БК	145	62	20	25
		150	63	21	26
		155	65,5	22,5	27,5
		160	68	24	28
		165	69,5	24	29
Половозрастная группа – дошкольная					
Стельки каркасные при плоскостопии (при низком своде стопы)	ОС-Д-1К	170	71	25	29
		175	72	26	30
		180	73	27	31
	ОС-Д-1КЧ	185	74	28	32
		190	75,5	29	33
		195	76,5	30	34
		200	78	31	35
Стельки каркасные при приведении переднего отдела стопы	ОС-Д-1КПОС	170	71	25	33
		175	72	26	34
		180	73	27	35
		185	74	28	36
		190	75	29	37
		195	76,5	30	38
		200	78	31	39
Стельки каркасные при плоско-вальгусной деформации стопы	ОС-Д-1КПВДС	170	71	25	34
		175	72	26	35
		180	73	27	36

¹ Обозначение стелек согласно РУ № РЗН 2020/12633 от 16.03.2022 г.

² Указаны половозрастные группы согласно вариантам исполнения «Обувь ортопедическая сложная по ТУ 32.50.22-001-26410155-2021» (согласно РУ № РЗН 2020/12633 от 16.03.2022 г. – деление по половозрастным группам следующее: детские, женские, мужские).

		185	74	28	37
		190	75	29	38
		195	76,5	30	39
		200	78	31	40
Стельки бескаркасные при плоскостопии (при низком своде стопы)	ОС-Д-1БК	170	71	25	30
		175	72	26	31
		180	73	27	32,5
		185	74	28	33
		190	75	29	34
		195	76,5	30	35,5
		200	78	31	36
Половозрастная группа – для школьников-мальчиков					
Стельки каркасные при плоскостопии (при низком своде стопы)	ОС-Д-1К	205	79	32	36
		210	79	32	37
		215	80	33	38
Стельки каркасные при плоскостопии с глубокой чашкой (при низком своде стопы)	ОС-Д-1КЧ	220	81	33	39
		225	82	34	40
		230	83	35	41
		235	84	35	42
		240	85	36	43
Стельки каркасные при приведении переднего отдела стопы	ОС-Д-1КПОС	205	79	32	40
		210	79	32	41
		215	80	33	42
		220	81	33	43
		225	82	34	44
		230	83	35	45
		235	84	35	46
		240	85	36	47
Стельки каркасные при плоско-вальгусной деформации стопы	ОС-Д-1КПВДС	205	79	32	41
		210	79	32	42
		215	80	33	43
		220	81	33	44
		225	82	34	45
		230	83	35	46
		235	84	35	47
		240	85	36	48
Стельки бескаркасные при плоскостопии (при низком своде стопы)	ОС-Д-1БК	205	79	32	37
		210	79	32	38
		215	80	33	39,5
		220	81	33	40
		225	82	34	41
		230	83	35	42
		235	84	35	43,5
		240	85	36	44
Половозрастная группа – для школьников-девочек					
Стельки каркасные при плоскостопии (при низком своде стопы)	ОС-Д-1К	205	79	32	36
		210	79	32	37
		215	80	33	38
Стельки каркасные при плоскостопии с глубокой чашкой (при низком своде стопы)	ОС-Д-1КЧ	220	81	33	39
		225	82	34	40
		230	83	35	41
		235	84	35	42
Стельки каркасные при приведении переднего отдела стопы	ОС-Д-1КПОС	205	79	32	40
		210	79	32	41
		215	80	33	42
		220	81	33	43
		225	82	34	44
		230	83	35	45
		235	84	35	46
Стельки каркасные при плоско-вальгусной деформации стопы	ОС-Д-1КПВДС	205	79	32	41
		210	79	32	42
		215	80	33	43
		220	81	33	44

		225	82	34	45
		230	83	35	46
		235	84	35	47
Стельки бескаркасные при плоскостопии (при низком своде стопы)	ОС-Д-1БК	205	79	32	37
		210	79	32	38
		215	80	33	39,5
		220	81	33	40
		225	82	34	41
		230	83	35	42
		235	84	35	43,5
	Половозрастная группа – подростковая мальчиковая				
Стельки каркасные при плоскостопии (при низком своде стопы)	ОС-М-1К	245	84	22	56
		250	85	22	58
		255	86,5	23	61
		260	88	23	64
		265	89	24	67
		270	90	24	70
		275	91	25	73
280	92	26	76		
Стельки каркасные при полой стопе (с высоким сводом)	ОС-М-1КПС	245	84	23	56
		250	85	23	58
		255	86,5	24	61
		260	88	24,5	64
		265	89	25	67
		270	90	25,5	70
		275	91	26	73
280	92	27	76		
Стельки каркасные при пяточной шпоре (с разгрузкой пятки)	ОС-М-1КПШ	245	84	22	56
		250	85	22	58
		255	86,5	23	61
		260	88	23	64
		265	89	24	67
		270	90	24	70
		275	91	25	73
280	92	26	76		
Стельки каркасные при плоско-вальгусной деформации стопы	ОС-М-1КПВДС	245	84	22	56
		250	85	22	58
		255	86,5	23	61
		260	88	23	64
		265	89	24	67
		270	90	24	70
		275	91	25	73
280	92	26	76		
Стельки бескаркасные при плоскостопии (при низком своде стопы)	ОС-М-1БК	245	84	22	56
		250	85	22	58
		255	86,5	23	61
		260	88	23	64
		265	89	24	67
		270	90	24	70
		275	91	25	73
280	92	26	76		
	Половозрастная группа – подростковая девичья				
Стельки каркасные при плоскостопии (при низком своде стопы)	ОС-Ж-1К	225	80	21	40
		230	81	22	42
		235	82	22	44
		240	83	22	46
		245	84	22	48
		250	85	23	50
		255	86,5	23	52
Стельки каркасные при полой стопе (с высоким сводом)	ОС-Ж-1КПС	225	80	22	44
		230	81	23	46
		235	82	23	48
		240	83	23	50

		245	84	23	52
		250	85	24	54
		255	86,5	24	56
Стельки каркасные при плоско-вальгусной деформации стопы	ОС-Ж-1КПВДС	225	80	21	48
		230	81	22	50
		235	82	22	52
		240	83	22	54
		245	84	22	56
		250	85	23	58
		255	86,5	23	60
Стельки бескаркасные при плоскостопии (при низком своде стопы)	ОС-Ж-1БК	225	80	21	40
		230	81	22	42
		235	82	22	44
		240	83	22	46
		245	84	22	48
		250	85	23	50
		255	86,5	23	52
	Половозрастная группа – мужская				
Стельки каркасные при плоскостопии (при низком своде стопы)	ОС-М-1К	245	84	22	56
		250	85	22	58
		255	86,5	23	61
		260	88	23	64
		265	89	24	67
		270	90	24	70
		275	91	25	73
		280	92	26	76
		285	93	27	79
		290	94	28	82
		295	95	29	85
		300	96	30	88
		305	97	31	91
Стельки каркасные при полой стопе (с высоким сводом)	ОС-М-1КПС	245	84	23	56
		250	85	23	58
		255	86,5	24	61
		260	88	24,5	64
		265	89	25	67
		270	90	25,5	70
		275	91	26	73
		280	92	27	76
		285	93	28	79
		290	94	29	82
		295	95	30	85
		300	96	31	88
		305	97	32	91
Стельки каркасные при пяточной шпоре (с разгрузкой пятки)	ОС-М-1КПШ	245	84	22	56
		250	85	22	58
		255	86,5	23	61
		260	88	23	64
		265	89	24	67
		270	90	24	70
		275	91	25	73
		280	92	26	76
		285	93	27	79
		290	94	28	82
		295	95	29	85
		300	96	30	88
		305	97	31	91
Стельки каркасные при плоско-вальгусной деформации стопы	ОС-М-1КПВДС	245	84	22	56
		250	85	22	58
		255	86,5	23	61
		260	88	23	64
		265	89	24	67
		270	90	24	70
		275	91	25	73

		280	92	26	76
		285	93	27	79
		290	94	28	82
		295	95	29	85
		300	96	30	88
		305	97	31	91
Стельки бескаркасные при плоскостопии (при низком своде стопы)	ОС-М-1БК	245	84	22	56
		250	85	22	58
		255	86,5	23	61
		260	88	23	64
		265	89	24	67
		270	90	24	70
		275	91	25	73
		280	92	26	76
		285	93	27	79
		290	94	28	82
		295	95	29	85
		300	96	30	88
		305	97	31	91
	Половозрастная группа – женская				
Стельки каркасные при плоскостопии (при низком своде стопы)	ОС-Ж-1К	210	78	20	37
		215	79	20	38
		220	79	21	39
		225	80	21	40
		230	81	22	42
		235	82	22	44
		240	83	22	46
		245	84	22	48
		250	85	23	50
		255	86,5	23	52
		260	88	23	54
		265	89	24	56
		270	90	24	58
275	91	24	60		
Стельки каркасные при полой стопе (с высоким сводом)	ОС-Ж-1КПС	210	78	21	38
		215	79	21	40
		220	79	22	42
		225	80	22	44
		230	81	23	46
		235	82	23	48
		240	83	23	50
		245	84	23	52
		250	85	24	54
		255	86,5	24	56
		260	88	24	58
		265	89	25	60
		270	90	25	62
275	91	25	64		
Стельки каркасные при плоско-вальгусной деформации стопы	ОС-Ж-1КПВДС	210	78	20	42
		215	79	20	44
		220	79	21	46
		225	80	21	48
		230	81	22	50
		235	82	22	52
		240	83	22	54
		245	84	22	56
		250	85	23	58
		255	86,5	23	60
		260	88	23	62
		265	89	24	64
		270	90	24	66
275	91	24	68		

Стельки бескаркасные при плоскостопии (при низком своде стопы)	ОС-Ж-1БК	210	78	20	37
		215	79	20	38
		220	79	21	39
		225	80	21	40
		230	81	22	42
		235	82	22	44
		240	83	22	46
		245	84	22	48
		250	85	23	50
		255	86,5	23	52
		260	88	23	54
		265	89	24	56
		270	90	24	58
		275	90	24	60

Обувь изготавливается на низком и среднем каблуке.

Высота каблука в детской обуви:

- для малодетской и дошкольной групп – не более 10 мм;
- школьников-мальчиков, школьников-девочек и мальчиковой групп – не более 20 мм;
- девичьей группы – не более 30 мм.

Передний край носочной части подошвы отстоит от опоры в обуви, не менее:

- на низком каблуке – от 10 до 15 мм;
- на среднем каблуке – от 8 до 12 мм;
- малодетской и дошкольной – от 8 до 10 мм;
- с металлической пластиной или на пробке, или с искусственным носком, или с искусственным перекатом – от 15 до 20 мм, при отсутствии в заказе специальных условий.

Прочность крепления деталей обуви, гибкость обуви, деформация задника, подноски, и специальных жестких ортопедических деталей соответствует требованиям ГОСТ 21463, ГОСТ 14226 и техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 007/2011 "О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков" от 23.09.2011 г.

Материалы и полуфабрикаты для изготовления обуви соответствуют требованиям действующих стандартов, указанных в табл. 7.

Таблица 7

№ п/п	Наименование детали	Наименование материала и обозначение нормативных документов (ГОСТ, ТУ)
1	Наружные детали верха обуви	
1.1	Перед, союзки, носки, задние наружные ремни, прошвы, берцы, задники, подблочники, закрепки, язычки, клапаны под молнию, обтяжки основных стелек, межстелечных слоев, шин	Кожа для верха обуви по ГОСТ 939
2	Внутренние детали верха обуви	
2.1	Подкладка, вкладная стелька, полустелька, подпятничник, задние внутренние ремни, подкрючечники, подблочники, штаферки	Кожа для подкладки обуви по ГОСТ 940; ткани для подкладки обуви по ГОСТ 19196; натуральный мех по ГОСТ 4661; искусственный мех по ГОСТ 28755
3	Промежуточные детали верха:	
3.1	- для межподкладки	Ткани для межподкладки по ГОСТ 19196, ГОСТ 29298
3.2	- для подноски	Кожа по ГОСТ 29277, ГОСТ 1903; обувная нитронскожа-Т по ГОСТ 7065
3.4	- для задника	Кожа по ГОСТ 29277, ГОСТ 1903
4	Наружные детали низа обуви:	
4.1	- для подошвы	Резиновые пористые пластины по ГОСТ 12632; термоэластопласт, полиуретан по требованиям ГОСТ Р 56965

4.2	- для ранта	Термоэластопласт по требованиям ГОСТ Р 56965
5	Внутренние детали низа обуви:	
5.1	- для межстелечного слоя	Кожа для низа обуви по ГОСТ 29277, ГОСТ 1903
6	Промежуточные детали низа обуви:	
6.1	- для геленка	Резиновые пористые пластины по ГОСТ 12632
6.2	- для подложки	Кожа для низа обуви по ГОСТ 29277, ГОСТ 1903
6.3	- для простилки	Простилочный картон по ГОСТ 9542 Нетканый материал для вкладной стельки (шерсть-50%, ПЭФ-50%)
7	Специальные детали	
7.1	- межстелечный слой	Кожа для низа обуви по ГОСТ 29277, ГОСТ 1903; резиновые пористые пластины по ГОСТ 12632
7.2	- жесткая деталь	Кожи для низа обуви по ГОСТ 1903, ГОСТ 29277, кожа шорно-седельная по ГОСТ 1904
7.3	- мягкая деталь	Кожи по ГОСТ 939, ГОСТ 940, шорно-седельная юфта по ГОСТ 1904
7.4	- стелька формованная (на межстелечный слой)	Кожи по ГОСТ 29277, ГОСТ 1903, ГОСТ 1838, ГОСТ 939, шорно-седельная юфта по ГОСТ 1904, кожа для подкладки обуви по ГОСТ 940
8	Фурнитура	
8.1	Закрепление обуви на стопе:	Люверсы, рамки металлические, шнурки обувные, молнии обувные, застежки текстильные, по ТД
8.2	Скрепления деталей низа (подошвы, ранты) с верхом обуви	Нитки из полиэстера 100% вошенные по ТД

Примечание: ¹ использование других материалов не допустимо.

Материалы, из которых изготовлена обувь, контактирующие в условиях эксплуатации с неповрежденными кожными покровами пациента, соответствуют требованиям биологической безопасности согласно ГОСТ Р 52770 и стандартов серии ГОСТ ISO 10993-1, ГОСТ ISO 10993-5, ГОСТ ISO 10993-10.

Для изготовления обуви используется сырье и материалы согласно табл. 8.

Таблица 8

№ п/п	Наименование материала	Марка материала ¹	Производитель
1	Кожа для верха обуви	Хромовая кожа, нубук	ЗАО СКЗ «Труд», (Россия) АО «Русская Кожа» (Россия), ИП Арутюнян (Россия)
2	Кожа для подкладки обуви	Свиной спилкок, яловая кожа	ЗАО СКЗ «Труд» (Россия), АО «Русская Кожа» (Россия)
3	Ткань для подкладки обуви:	Байка	АО «Термопласт» (Таганрог, Россия)
		Натуральный мех (овчина)	Салтыковская меховая фабрика (Россия)
		Искусственный мех (мех обувной гладкокрашенный)	ЗАО «Искусственный Мех» (Россия)
4	Ткань для межподкладки	Бязь клеевая	ООО «Навитекс» (Россия)
5	Кожа для подноски:	Гранитоль 0,8 мм, 1 мм	АО «Термопласт» (Таганрог, Россия)
		Обувная нитроискожа-Т	ЗАО «Искож» (Россия)
6	Кожа для задника	Гранитоль 1,8 мм, 2 мм	АО «Термопласт» (Таганрог, Россия)
7	Материал для подошвы	Термоэластопласт Полиуретан	ООО «Скортек» (Россия) ИП Калюта Е.В. (ПЛАСТЕВРО) (Россия)
		Микропористая резина	ООО «Эвапрофи» (Россия)
	Материал для ранта	Термоэластопласт	ООО «Скортек» (Россия)
8	Кожа для межстелечного слоя	Полукожа для низа обуви	ООО Рыбинский кожевенный завод (Россия)
9	Материал для геленка	Микропористая резина	ООО «Эвапрофи» (Россия)

10	Кожа для подложки	Чепрак для низа обуви (хромовая кожа)	ЗАО СКЗ «Труд» (Россия), АО «Русская Кожа» (Россия)
11	Материал для простилки	Картон обувной ПР Нетканый материал для вкладной стельки (шерсть-50%, ПЭФ-50%)	ЗАО «Искож» (Россия) АО «Термопласт» (Таганрог, Россия)
Специальные детали			
12	Кожа для межстельчного слоя	Чепрак для низа обуви (хромовая кожа)	ООО Рыбинский кожевенный завод (Россия)
13	Резиновые пористые пластины	Микропористая резина	ООО «Эвапрофи» (Россия)
14	Кожа для жесткой детали	Хромовая кожа (чепрак) Кожа шорно-седельная (чепрак, пола, полукожа свыше 3 мм)	ОАО «Богородский завод хромовых кож» (Россия), ООО «Кожсервис» (Россия),
15	Кожа для мягкой детали	Яловая кожа Шорно-седельная юфта (юфта натуральная, толщина 1,1-2,6 мм)	ЗАО СКЗ «Труд» (Россия), АО «Русская Кожа» (Россия)
16	Кожа для стельки формованной	Хромовая кожа (чепрак) Шорно-седельная юфта (юфта натуральная, толщина 1,1-3мм+)	ЗАО СКЗ «Труд» (Россия), АО «Русская Кожа» (Россия) ОАО «Богородский завод хромовых кож» (Россия)
17	Люверсы, рамки металлические, молнии обувные, застежки текстильные (велкро), шнурки обувные	Сталь Нейлон Пластик Полиацеталь Полиэфир	ООО «Фурнитур-ВУ» (Россия)
18	Нитки из 100% полиэстера вошьенные	Нитки плетеные вошьенные 100% полиэстер в ассортименте	ООО «Теста» (Россия)

Примечание: ¹ использование других материалов не допустимо.

Комплект поставки (комплектность):

В комплект поставки входит:

- Обувь – 1 пара (полупара), уложенная в потребительскую (индивидуальную) упаковку (картонная коробка).
- Инструкция по применению – 1 экз. (вложена в потребительскую упаковку).

4. Меры предосторожности при применении и предупреждения

- Обувь назначается только врачом-ортопедом и изготавливается по медицинскому заказу.
- Необходимо правильно подбирать обувь по размеру и объему (полноте) стопы: стопа в обуви не должна быть сжата.
- Обувь по конструкции должна соответствовать функциональному (медицинскому) назначению
- Обувь предназначена для применения только одним пациентом.
- Не снимать обувь, наступая на задник; при надевании обуви использовать рожек;
- Необходимо соблюдать рекомендации по уходу за обувью (см. раздел 7 Инструкции).
- Избегать воздействия на обувь щелочей, кислот, активных растворителей и т.п.
- Обувь необходимо беречь от влаги, прямых солнечных лучей (при хранении и транспортировке).
- Необходимо соблюдать условия транспортировки и хранения обуви.

Внимание! Изготовитель не несет ответственность в случае обуви другим пациентом, которое может привести к проблемам для пациента, таким как мозоли,

потертости кожных покровов с последующим инфицированием и развитием гнойно-воспалительных заболеваний стопы и голени.

5. Требования безопасности применения МИ

- Обувь по конструкции должна соответствовать функциональному (медицинскому) назначению
- Обувь должна быть изготовлена из материалов, безопасных для здоровья пользователя. Детская ортопедическая обувь должна соответствовать по биологической и механической безопасности требованиям согласно Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 007/2011 "О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков" от 23.09.2011 г.
- При использовании обуви не должно возникать болевых ощущений в стопе и вышележащих суставах, а также покраснений и нарушений кожных покровов (потертостей).
- Обувь должна быть плотно закреплена на ноге.
- Обувь должна иметь устойчивое сцепление с опорной поверхностью за счет фрикционных свойств применяемых материалов или рельефа ходовой поверхности подошвы.
- Детали обуви, контактирующие в условиях эксплуатации с неповрежденными кожными покровами пациента, должны соответствовать требованиям биологической безопасности согласно ГОСТ Р 52770 и стандартов серии ГОСТ ISO 10993-1, ГОСТ ISO 10993-5, ГОСТ ISO 10993-10.

6. Описание маркировки и предупреждающих надписей, упаковки

Маркировка обуви и потребительской упаковки

Каждая полупара обуви замаркирована в соответствии с требованиями табл. 9.

Таблица 9

Содержание маркировки	Место нанесения маркировки	Способ нанесения маркировки
Товарный знак или наименование предприятия изготовителя	В геленочной части вкладной стельки (полустельки), или на подпяточнике, или на кожаной подкладке верхней части берца, или на клапане под креплением (застежка «контакт» или «молния»).	Несмываемой краской или горячим тиснением, в том числе через фольгу.
Модель с указанием материала верха и подкладки обуви; дата выпуска (месяц, год); знак «Ст»	На ярлык, прикрепляемый к подкладке каждой полупары обуви или другим деталям.	Несмываемой краской или горячим тиснением, в том числе через фольгу.
Номер контролера, ОТК (Клеймо ОТК)	На штаферке, или на кожаной подкладке под берцы в верхней части, или на клапане под креплением (застежка «контакт» или «молния»).	Штемпелевание.
Размер штихмассовый	На ходовой поверхности подошвы в геленочной части каждой полупары	Формуются в процессе литья в пресс-форме.

Маркировка потребительской упаковки (коробки из картона для обуви) выполнена в соответствии с требованиями п. 3.1.4 ГОСТ Р 57838 по пунктам применимым к изделиям данного вида и требованиям ГОСТ Р ИСО 15223-1.

На торцевой поверхности каждой коробки с обувью прикреплена этикетка (стикер) со следующей информацией:

- товарного знака предприятия-изготовителя ( «ОРТО КУБАНЬ-ЮГ»);
- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на медицинское изделие (РУ);
- полное наименование изделия с указанием номера технических условий (ТУ);
- наименование вида и половозрастной группы обуви;
- шифр модели;
- наименование и адрес изготовителя (, включая страну-изготовителя, указываются напротив символа по ГОСТ Р ИСО 15223-1;

- адрес организации, уполномоченной на принятие и удовлетворение требований от потребителей в отношении товаров ненадлежащего качества
- материал верха, подкладки и подошвы обуви;
- цвет обуви;
- штрих-код;
- номер партии (Lot); размер штихмассовый; цвет; дата изготовления (год, месяц) , указываются напротив символов по ГОСТ Р ИСО 15223-1;
- символы по ГОСТ Р ИСО 15223-1: условия хранения (температурный диапазон ; диапазон влажности ; не допускать воздействия солнечного света );
- знак «Ст»;
- знак обращения на рынке .

Упаковка

Обувь упакована в потребительскую и транспортную тару в соответствии с требованиями раздела 4 ГОСТ Р 57838 по пунктам применимым к изделиям данного вида.

Обувь упакована попарно в картонные коробки с перестиланием бумагой по ГОСТ 8273.

Каждая пара обуви упакована в потребительскую (индивидуальную) упаковку – коробку из картона для обуви по ГОСТ 16534.

Картонные коробки для упаковывания детской обуви художественно оформлены по образцам, утвержденным в установленном порядке.

Потребительская упаковка допускается трех размеров, размеры коробок должны соответствовать следующим параметрам (длина x ширина x высота):

- маленькая $280 \pm 10 \times 175 \pm 10 \times 105 \pm 5$ мм (для обуви размером 145-150-155-160-165-170-175-180-185-190);
- средняя $330 \pm 15 \times 200 \pm 12 \times 120 \pm 5$ мм (для обуви размером 195-200-205-210-215-220-225);
- большая $350 \pm 15 \times 280 \pm 15 \times 125 \pm 5$ мм (для обуви размером 230-235-240-245-250-255-260-265-270-275-280-285-290-295-300-305).

Полуботинки, туфли и сандалеты уложены в коробку носком одной полупары к пяточной части другой полупары.

Ботинки, сандалеты с высоким берцем уложены в коробку без загиба берцев, носком одной полупары к пяточной части другой полупары.

В носочную часть каждой полупары обуви вложен вкладыш из коробочного картона по ГОСТ 7933 или других материалов, предохраняющих от деформации при транспортировании и хранении, по нормативным документам.

В каждую индивидуальную упаковку вложена Инструкция по применению обуви.

В качестве транспортной упаковки применяют ящики из гофрированного картона по ГОСТ 9142, ГОСТ 13514.

Картонные коробки с обувью должны быть плотно уложены в транспортную упаковку. Количество обуви в транспортной упаковке и схему укладки определяет изготовитель обуви.

Транспортные коробки из гофрированного картона, с упакованной обувью, должны быть оклеены по периметру в середине ящика полиэтиленовой лентой с липким слоем по ГОСТ 20477. Для оклейки клапанов и ребер картонного ящика также должна использоваться полиэтиленовая лента с липким слоем по ГОСТ 20477.

Масса (брутто) одного упакованного ящика (места) не должна превышать 50 кг

Транспортная маркировка в соответствии с ГОСТ 14192, на каждый ящик с боковой стороны должен быть прикреплен ярлык (стикер) с указанием:

- товарного знака предприятия-изготовителя ( «ОРТО КУБАНЬ-ЮГ»);
- полное наименование изделия с указанием номера технических условий (ТУ);

- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на медицинское изделие (РУ);
- наименование вида и половозрастной группы обуви;
- шифр модели;
- наименование и адрес изготовителя () указываются напротив символа по ГОСТ Р ИСО 15223-1;
- штрих-код
- номер партии (Lot); размер штихмассовый; цвет; дата изготовления (год, месяц) () указываются напротив символов по ГОСТ Р ИСО 15223-1;
- символы по ГОСТ Р ИСО 15223-1: условия хранения (температурный диапазон ; диапазон влажности ; не допускать воздействия солнечного света );
- символ по ГОСТ 14192 – беречь от влаги ;
- знак обращения на рынке ;
- количества пар обуви в ящике;
- даты упаковки и номер упаковщика.

7. Эксплуатация медицинского изделия и порядок применения МИ

Обувь ортопедическая сложная по ТУ 32.50.22-001-26410155-2021, варианты исполнения используется только одним пациентом по назначению врача-ортопеда в повседневных и/или домашних условиях.

Условия эксплуатации медицинского изделия:

- в условиях умеренного климата по ГОСТ 15150, но для применения при температуре от +40°C до -20°C
- атмосферное давление от 700 гПа до 1060 гПа.
- беречь от влаги.

Порядок применения

1. Достаньте обувь из коробки, проверьте соответствие маркировки на ярлыке обуви и маркировки на потребительской упаковке (коробке).
2. Внимательно осмотрите обувь снаружи и изнутри, убедитесь в отсутствии дефектов: трещин, царапин, расщелин между деталями низа, сквозных повреждений, асимметричности деталей между полупарами обуви.
3. Желательно носить обувь с носками, гольфами или колготками, за исключением, в некоторых случаях, летней открытой обуви.
4. При надевании обуви закрытого типа необходимо пользоваться обувным рожком, чтобы предотвратить порыв швов и деформацию обуви.
5. Обувь с ремешками и резинками имеет специальные приспособления для захвата при обувании. Нельзя тянуть непосредственно за ремни и резинки.
6. Начиная носить новую обувь, обращайте внимание на состояние стопы и голени. При возникновении потертостей или аллергических реакций на материалы обуви следует прекратить использование изделием и обратиться к врачу.
7. Во избежание отрыва подошвы и деформации задника, нужно снимать обувь, не наступая и не надавливая на задник.
8. Нежелательно носить одну и ту же пару ежедневно в течение длительного времени, нужно дать обуви возможность высохнуть естественным путем.

Уход за обувью

1. После каждой носки обувь очищается от пыли, грязи, а в случае загрязнения жирами необходимо использовать 1-2% мыльный раствор. Обувь из кожи и текстиля чистить мягкой влажной тряпочкой.

2. Сушить мокрую обувь необходимо при комнатной температуре вдали от отопительных приборов, источников тепла, избегая попадания прямых солнечных лучей, предварительно набив её смятой бумагой. Возможно применение специальных приспособлений для сушки обуви.

3. Для длительной службы обуви необходимо применение обувных косметических средств. Перед использованием средства к конкретному виду обуви внимательно изучить инструкцию по применению этого средства.

4. Чистить обувь из кожи (кроме нубука и велюра) с применением специального обувного крема; обувь из нубука и велюра – специальными резиновыми щетками, ластиками или специальными препаратами; обувь из лаковой кожи – жидкостью для чистки лаковой обуви; обувь из текстиля – специальными щетками или мягкой влажной тканью.

8. Хранение и транспортирование медицинского изделия

Условия хранения:

- Температура от +14 до +25°C.
- Относительная влажность воздуха от 50% до 80%.
- Атмосферное давление от 700 гПа до 1060 гПа.
- Беречь от влаги, прямых солнечных лучей.

Правила хранения:

Обувь должна храниться в складских помещениях в потребительской таре на стеллажах или деревянных настилах штабелями высотой не более 1,5 м.

Расстояние от пола до настила или нижней части полки стеллажа должно быть от 0,2 до 0,7 м, расстояние хранящейся обуви от наружных стен склада, отопительных и нагревательных приборов должно быть не менее 1,0 м. Между стеллажами, штабелями и стенками склада должны быть проходы шириной не менее 0,7 м.

Обувь должна быть защищена от попадания прямых солнечных лучей, от воздействия паров, газов и химических веществ.

Складское помещение должно иметь достаточное естественное или искусственное освещение в соответствии с действующими нормами строительного проектирования

Условия транспортировки:

- Температура транспортировки: -50 до +50°C,
- Относительная влажность воздуха не более 85%.
- Атмосферное давление от 700 гПа до 1060 гПа.
- Беречь от влаги, прямых солнечных лучей.

Правила транспортирования:

Транспортирование обуви производят в соответствии с ГОСТ Р 57838 всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта. Транспортирование обуви должно производиться в транспортной упаковке.

9. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие обуви требованиям настоящих технических условий при условии соблюдения потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок носки обуви устанавливают со дня выдачи обуви потребителю или с начала сезона не менее 30 дней.

Начало сезона определено в соответствии с Законом РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

В течение гарантийного срока изготовитель принимает претензии по качеству обуви и производит ремонт или безвозмездную замену обуви, преждевременно вышедшей из строя не по вине потребителя. Ремонт изделия осуществляется *только изготовителем*, в случае преждевременно вышедшей из строя обуви не по вине потребителя.

Гарантийный талон приведен в приложении к данной Инструкции.

Срок службы (использования) обуви должен быть не менее 6 месяцев, для детей инвалидов – не менее 3 месяцев.

Производитель не несет ответственности за качество изделия в связи с неправильным применением или хранением.

10. Правила и условия утилизации

Утилизацию и уничтожение обуви по окончании срока службы следует проводить в соответствии с СанПиН 2.1.3684 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий (раздел X)».

Класс опасности медицинских отходов – А (эпидемиологически безопасные отходы).

11. Претензии в отношении товара ненадлежащего качества направлять по адресу:

Общество с ограниченной ответственностью «Орто Кубань-Юг» (ООО «Орто Кубань-Юг»)

Адрес: 350047, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, проезд 3-й линии, д. 4, телефон +7 (861) 222-58-96, +7 (918) 162-50-46, адрес электронной почты: ksp_123@mail.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Уважаемый покупатель!

Обувь ортопедическая сложная по ТУ 32.50.22-001-26410155-2021, варианты исполнения соответствует требованиям, предъявляемым к обуви, изложенными в ГОСТ Р 54407-2020 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия».

Гарантийный талон дает право на бесплатный ремонт в течение действия гарантийного срока использования обуви.

Отметка о выдаче

Номер заказа _____

Наименование изделия (шифр) _____

Дата выдачи заказа _____

Подпись _____ место печати

Дата изготовления _____

ОТК _____

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «Орто Кубань-Юг» (ООО «Орто Кубань-Юг»)

Адрес: 350047, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, проезд 3-й линии, д. 4, тел. +7 (861) 222-58-96, +7 (918) 162-50-46, адрес электронной почты: ksp_123@mail.ru

Просьба сохранять талон до истечения гарантийного срока использования (носки)

Дата последней редакции «Инструкции по применению» – 30.09.2022 г.

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

41 листов
Генеральный директор ООО
«Орто Кураль-Юг»

Н.А. Каплиева

