

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Термометр клинический NexTemp

При измерении температуры необходимо помнить, что средняя нормальная температура тела может изменяться в пределах от 36,1 °С до 37,2 °С. Обычно утренняя температура на несколько десятых долей градуса или даже на целый градус меньше, чем вечерняя. Чтобы определить Вашу нормальную температуру, необходимо в течение нескольких дней измерять температуру утром и вечером.

Технические данные

Область измерений термометра клинического NexTemp от 35.5 оС до 40.4 оС

Метод измерения : метод определения максимума

Цена деления шкалы 0,1

Погрешность измерений ± 0.1 оС (при окружающей температуре около 23 оС)

Единицы измерения: градусы по Цельсию (оС).

Габаритные размеры, мм 95x10x1

Масса, г 1

Условия эксплуатации: температура 10-35 оС; влажность 100%

Комплектность: термометр клинический NexTemp, упавовочный конверт

Меры предосторожности

Настоящий термометр предназначен ТОЛЬКО для измерения температуры тела.

1. Термометр предназначен для измерения температуры только подмышечным, или оральным способами.

3. Чтобы очистить термометр и дезинфицировать можно использовать воду и 70% спиртовые растворы. Ни в коем случае не используйте бензиносодержащие растворы, растворители и пр.

Порядок измерения

1. Поместите датчик термометра под руку (либо в другое место, как указано в разделе "Способы измерения температуры").

2. Подержите термометр в таком положении минут пять.

3. Значение температуры можно будет определить, подсчитав количество потемневших точек на индикаторной части термометра

Способы измерения температуры

ОРАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ

Перед измерением температуры подержите рот закрытым в течение 5 минут.

Поместите индикаторную часть термометра под язык, поддерживая ее языком. Закройте рот.

ПОДМЫШЕЧНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ

Перед измерением вытрите пот под рукой сухим полотенцем и опустите руку приблизительно на пять минут. Поместите индикаторную часть термометра в подмышечную впадину крепко прижав руку. Время измерения температуры таким способом около 5 минут.

ОРАЛЬНЫЙ//ПОДМЫШЕЧНЫЙ СПОСОБЫ

Подмышечная температура может быть на 1 градус ниже оральной. Все вопросы по этому поводу следует задать врачу.

Избегайте измерения температуры в течение 30 минут после еды, бега, занятий спортом, принятия ванны, так как температура тела в этом случае может быть выше.