

«APPROVED» BY

General Manager CITOTEST
LABWARE
MANUFACTURING CO., LTD
Wang Zhong

3rd of April, 2015

Инструкция по применению медицинского изделия
Стекла предметные для микроскопических исследований

1. Назначение

Клиническая лабораторная диагностика. Для проведения микроскопических исследований.

2. Характеристика и принцип работы

2.1. Принцип метода

Стекло предметное 76x39 мм

Варианты исполнения: с двусторонней матовой полосой и обрезным краем, с двусторонней матовой полосой и шлифованной кромкой, с матовой полосой и обрезной кромкой, с матовой полосой и шлифованной кромкой, с обрезной кромкой, со шлифованной кромкой.

Предметное стекло является местом размещения образца гистологического, цитологического и другого вида материала с целью его последующей окраски и микроскопии. Предметное стекло нестандартного размера, большое, используется в ручных методах окраски. Стекла имеют гладкую поверхность, высокую степень очистки, прозрачные. Могут иметь несколько вариантов исполнения в различных комбинациях: наличие матовой полосы создает поле для идентификационной надписи, шлифованная кромка обеспечивает комфорт и защиту для пальцев лаборанта при работе со стеклами, шлифованный край в отличие от обрезного края не «врезается» в пальцы и не травмирует кожу при длительной работе со стеклами.



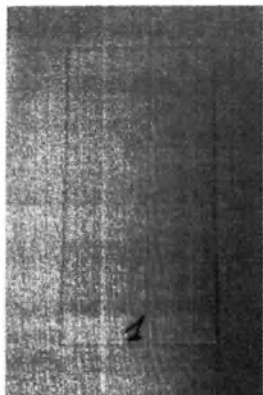


Рисунок 1 – Стекло предметное 76x39 мм с матовой полосой и шлифованной кромкой

Стекло предметное 76x52 мм

Варианты исполнения: с матовой полосой и обрезной кромкой, с матовой полосой и шлифованной кромкой, с обрезной кромкой, со шлифованной кромкой

Предметное стекло является местом размещения образца гистологического, цитологического и другого вида материала с целью его последующей окраски и микроскопии. Предметное стекло нестандартного размера, большое, используется в ручных методах окраски. Стекла имеют гладкую поверхность, высокую степень очистки, прозрачные. Могут иметь несколько вариантов исполнения в различных комбинациях: наличие матовой полосы создает поле для идентификационной надписи, шлифованная кромка обеспечивает комфорт и защиту для пальцев лаборанта при работе со стеклами, шлифованный край в отличие от обрезного края не «врезается» в пальцы и не травмирует кожу при длительной работе со стеклами.

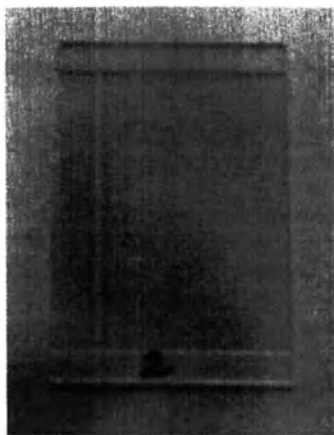


Рисунок 1.1 – Стекло предметное 76x52 мм с матовой полосой и шлифованной кромкой

Стекло предметное 75x25 мм

Варианты исполнения: с двусторонней матовой полосой и обрезной кромкой, с двусторонней матовой полосой и шлифованной кромкой, с матовой полосой и обрезной кромкой, с матовой полосой и шлифованной кромкой, с обрезной кромкой, со

шлифованной кромкой, с колорированным краем: белым, голубым, зеленым, лиловым, оранжевым, розовым, коричневым, желтым.

Предметное стекло является местом размещения образца гистологического, цитологического и другого вида материала с целью его последующей окраски и микроскопии. Предметное стекло стандартного размера, используется в ручных и аппаратных методах окраски. Стекла имеют гладкую поверхность, высокую степень очистки, прозрачные. Могут иметь несколько вариантов исполнения в различных комбинациях: наличие матовой полосы создает поле для идентификационной надписи; шлифованная кромка обеспечивает комфорт и защиту для пальцев лаборанта при работе со стеклами, шлифованный край в отличие от обрезного края не «врезается» в пальцы и не травмирует кожу при длительной работе со стеклами; колорированный край является, с одной стороны, полем для записи, а с другой стороны, разноцветные края стекол позволяют систематизировать и классифицировать препараты на стеклах.

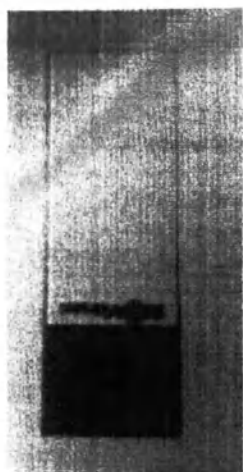


Рисунок 1.3 Стекло предметное 75x25 мм с колорированным краем зеленого цвета

Стекло предметное 75x25 мм с адгезивным покрытием PCL

Варианты исполнения: с двусторонней матовой полосой и обрезной кромкой, с двусторонней матовой полосой и шлифованной кромкой, с матовой полосой и обрезной кромкой, с матовой полосой и шлифованной кромкой, с обрезной кромкой, со шлифованной кромкой, с колорированным краем: белым, голубым, зеленым, лиловым, оранжевым, розовым, коричневым, желтым.

Предметное стекло является местом размещения образца гистологического, цитологического и другого вида материала с целью его последующей окраски и микроскопии. Предметное стекло стандартного размера, используется в ручных и аппаратных методах окраски. Стекла имеют гладкую поверхность, высокую степень очистки, прозрачные. Адгезивное покрытие обеспечивает надежное прилипание образца материала к поверхности стекла, что является дополнительной защитой от потери образца. Могут иметь несколько вариантов исполнения в различных комбинациях: наличие

матовой полосы создает поле для идентификационной надписи; шлифованная кромка обеспечивает комфорт и защиту для пальцев лаборанта при работе со стеклами, шлифованный край в отличие от обрезного края не «врезается» в пальцы и не травмирует кожу при длительной работе со стеклами; колорированный край является, с одной стороны, полем для записи, а с другой стороны, разноцветные края стекол позволяют систематизировать и классифицировать препараты на стеклах. По истечению срока годности стекло может быть использовано как обычное предметное стекло без покрытия.



Рисунок 1.4 - Стекло предметное 75x25 мм с адгезивным покрытием PCT с колорированным краем белого цвета

Стекло предметное 75x25 мм с адгезивным покрытием PCT

Варианты исполнения: с двусторонней матовой полосой и обрезной кромкой, с двусторонней матовой полосой и шлифованной кромкой, с матовой полосой и обрезной кромкой, с матовой полосой и шлифованной кромкой, с обрезной кромкой, со шлифованной кромкой, с колорированным краем: белым, голубым, зеленым, лиловым, оранжевым, розовым, коричневым, желтым.

Предметное стекло является местом размещения образца гистологического, цитологического и другого вида материала с целью его последующей окраски и микроскопии. Предметное стекло стандартного размера, используется в ручных и аппаратных методах окраски. Стекла имеют гладкую поверхность, высокую степень очистки, прозрачные. Адгезивное покрытие обеспечивает надежное прилипание образца материала к поверхности стекла, что является дополнительной защитой от потери образца. Могут иметь несколько вариантов исполнения в различных комбинациях: наличие матовой полосы создает поле для идентификационной надписи; шлифованная кромка обеспечивает комфорт и защиту для пальцев лаборанта при работе со стеклами, шлифованный край в отличие от обрезного края не «врезается» в пальцы и не травмирует кожу при длительной работе со стеклами; колорированный край является, с одной стороны, полем для записи, а с другой стороны, разноцветные края стекол позволяют систематизировать и классифицировать препараты на стеклах. По истечению срока годности стекло может быть использовано как обычное предметное стекло без покрытия.

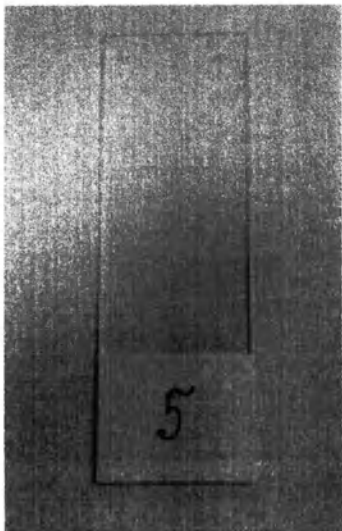


Рисунок 1.5 - Стекло предметное 75x25 мм с адгезивным покрытием РСІ с колорированным краем белого цвета

Стекло предметное 75x25 мм с углами 45 градусов

Варианты исполнения: с двусторонней матовой полосой и обрезной кромкой, с двусторонней матовой полосой и шлифованной кромкой, с матовой полосой и обрезной кромкой, с матовой полосой и шлифованной кромкой, с обрезной кромкой, со шлифованной кромкой, с колорированным краем: белым, голубым, зеленым, лиловым, оранжевым, розовым, коричневым, желтым.

Предметное стекло является местом размещения образца гистологического, цитологического и другого вида материала с целью его последующей окраски и микроскопии. Предметное стекло стандартного размера, используется в ручных и аппаратных методах окраски. Имеет углы по 45градусов для совместного использования в принтерах для маркировки. Стекла имеют гладкую поверхность, высокую степень очистки, прозрачные. Могут иметь несколько вариантов исполнения в различных комбинациях: наличие матовой полосы создает поле для идентификационной надписи; шлифованная кромка обеспечивает комфорт и защиту для пальцев лаборанта при работе со стеклами, шлифованный край в отличие от обрезного края не «врезается» в пальцы и не травмирует кожу при длительной работе со стеклами; колорированный край является, с одной стороны, полем для записи, а с другой стороны, разноцветные края стекол позволяют систематизировать и классифицировать препараты на стеклах.

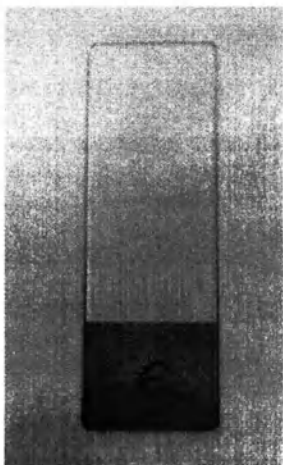


Рисунок 1.6 - Стекло предметное 75х25 с углами 45 градусов с колорированным краем голубого цвета

Стекло предметное 75х25 мм со скошенной кромкой и углами 45 градусов

Варианты исполнения: гладкие, с двусторонней матовой полосой, с матовой полосой, с колорированным краем: белым, голубым, зеленым, лиловым, оранжевым, розовым, коричневым, желтым.

Предметное стекло является местом размещения образца гистологического, цитологического и другого вида материала с целью его последующей окраски и микроскопии. Предметное стекло стандартного размера, используется в ручных и аппаратных методах окраски. Имеет углы по 45 градусов для совместного использования в принтерах для маркировки, а также скошенную кромку для более комфортного и безопасного обращения лаборанта со стеклами в повседневной работе. Стекла имеют гладкую поверхность, высокую степень очистки, прозрачные. Могут иметь несколько вариантов исполнения в различных комбинациях: наличие матовой полосы создает поле для идентификационной надписи; колорированный край является, с одной стороны, полем для записи, а с другой стороны, разноцветные края стекол позволяют систематизировать и классифицировать препараты на стеклах.



Рисунок 1.7 - Стекло предметное 75х25 мм со скошенной кромкой и углами 45 градусов с матовой полосой

Стекло предметное 75x25 мм для струйных принтеров с углами 45 градусов и с колорированным краем: белым, голубым, зеленым, лиловым, оранжевым, розовым, коричневым, желтым.

Предметное стекло является местом размещения образца гистологического, цитологического и другого вида материала с целью его последующей окраски и микроскопии. Предметное стекло стандартного размера, используется в ручных и аппаратных методах окраски. Имеет углы по 45градусов, а также колорированный край для совместного использования в струйных принтерах для маркировки. Стекла имеют гладкую поверхность, высокую степень очистки, прозрачные. Колорированный край является, с одной стороны, полем для записи, а с другой стороны, разноцветные края стекол позволяют систематизировать и классифицировать препараты на стеклах.

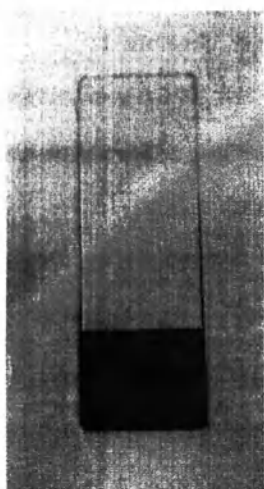


Рисунок 1.8 - Стекло предметное 75x25 мм для струйных принтеров с углами 45 градусов и с колорированным краем голубого цвета

Стекло предметное 75x25 мм для термотрансферных принтеров с обрезной кромкой и колорированным краем: белым, голубым, зеленым, лиловым, оранжевым, розовым, коричневым, желтым.

Предметное стекло является местом размещения образца гистологического, цитологического и другого вида материала с целью его последующей окраски и микроскопии. Предметное стекло стандартного размера, используется в ручных и аппаратных методах окраски. Имеет обрезную кромку, а также колорированный край для совместного использования в термотрансферных принтерах для маркировки. Стекла имеют гладкую поверхность, высокую степень очистки, прозрачные. Колорированный край является, с одной стороны, полем для записи, а с другой стороны, разноцветные края стекол позволяют систематизировать и классифицировать препараты на стеклах.

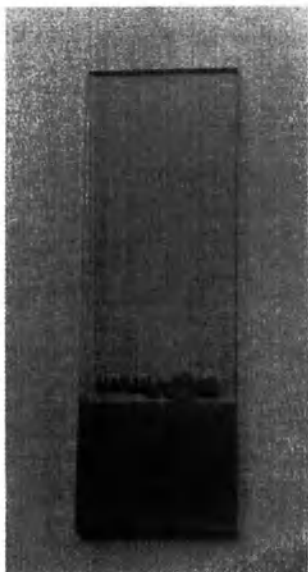


Рисунок 1.9 - Стекло предметное 75x25 мм для термотрансферных принтеров с обрезной кромкой и колорированным краем зеленого цвета

Стекло предметное 75x25 мм для термотрансферных принтеров со шлифованной кромкой и колорированным краем: белым, голубым, зеленым, лиловым, оранжевым, розовым, коричневым, желтым.

Предметное стекло является местом размещения образца гистологического, цитологического и другого вида материала с целью его последующей окраски и микроскопии. Предметное стекло стандартного размера, используется в ручных и аппаратных методах окраски. Имеет шлифованную кромку и колорированный край для совместного использования в термотрансферных принтерах для маркировки. Стекла имеют гладкую поверхность, высокую степень очистки, прозрачные. Шлифованная кромка обеспечивает комфорт и защиту для пальцев лаборанта при работе со стеклами, шлифованный край в отличие от обрезного края не «врезается» в пальцы и не травмирует кожу при длительной работе со стеклами. Колорированный край является, с одной стороны, полем для записи, а с другой стороны, разноцветные края стекол позволяют систематизировать и классифицировать препараты на стеклах.

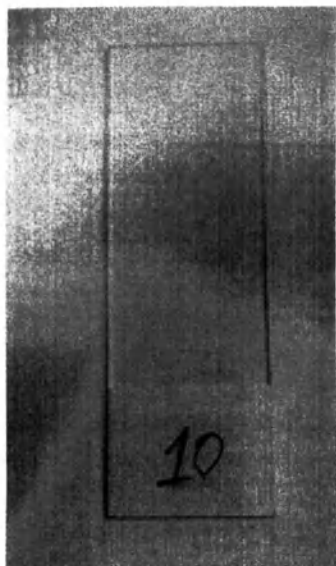


Рисунок 1.10 - Стекло предметное 75x25 мм для термотрансферных принтеров со шлифованной кромкой и колорированным краем белого цвета

Стекло предметное 75x25 мм для термотрансферных принтеров с углами 45 градусов и с колорированным краем: белым, голубым, зеленым, лиловым, оранжевым, розовым, коричневым, желтым.

Предметное стекло является местом размещения образца гистологического, цитологического и другого вида материала с целью его последующей окраски и микроскопии. Предметное стекло стандартного размера, используется в ручных и аппаратных методах окраски. Имеет углы по 45градусов, а также колорированный край для совместного использования в термотрансферных принтерах для маркировки. Стекла имеют гладкую поверхность, высокую степень очистки, прозрачные. Колорированный край является, с одной стороны, полем для записи, а с другой стороны, разноцветные края стекол позволяют систематизировать и классифицировать препараты на стеклах.

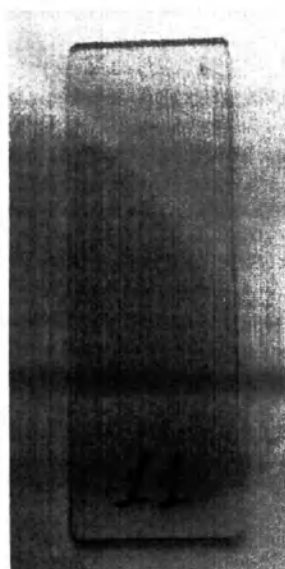


Рисунок 1.11 - Стекло предметное 75x25 мм для термотрансферных принтеров с углами 45 градусов и с колорированным краем желтого цвета

Стекло предметное 75x25 мм для термотрансферных принтеров со скошенной кромкой и углами 45 градусов и с колорированным краем: белым, голубым, зеленым, лиловым, оранжевым, розовым, коричневым, желтым.

Предметное стекло является местом размещения образца гистологического, цитологического и другого вида материала с целью его последующей окраски и микроскопии. Предметное стекло стандартного размера, используется в ручных и аппаратных методах окраски. Имеет углы по 45градусов и колорированный край для термотрансферных принтеров, а также скошенную кромку для более комфортного и безопасного обращения лаборанта со стеклами в повседневной работе. Стекла имеют гладкую поверхность, высокую степень очистки, прозрачные. Колорированный край является, с одной стороны, полем для записи, а с другой стороны, разноцветные края стекол позволяют систематизировать и классифицировать препараты на стеклах.

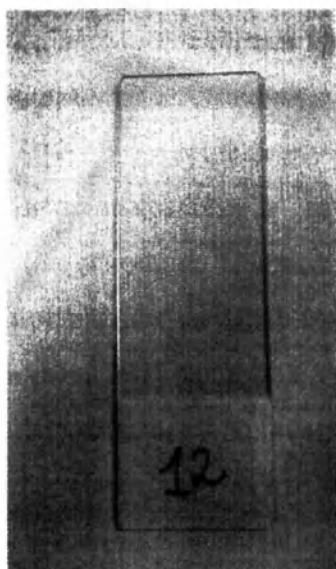


Рисунок 1.12 - Стекло предметное 75x25 мм для термотрансферных принтеров со скошенной кромкой и углами 45 градусов и с колорированным краем белого цвета

Стекло предметное 75x25 мм для инверсной печати с углами 45 градусов и с колорированным краем: белым, голубым, зеленым, лиловым, оранжевым, розовым, коричневым, желтым.

Предметное стекло является местом размещения образца гистологического, цитологического и другого вида материала с целью его последующей окраски и микроскопии. Предметное стекло стандартного размера, используется в ручных и аппаратных методах окраски. Имеет углы по 45градусов, а также колорированный край для инверсной печати. Стекла имеют гладкую поверхность, высокую степень очистки, прозрачные. Колорированный край является, с одной стороны, полем для записи, а с другой стороны, разноцветные края стекол позволяют систематизировать и классифицировать препараты на стеклах.

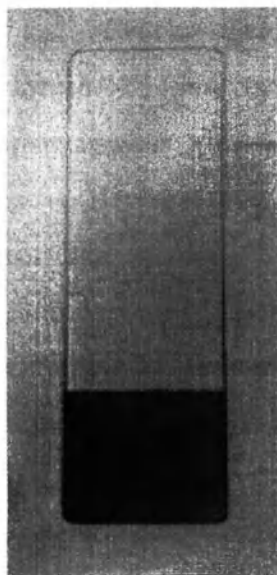


Рисунок 1.13 - Стекло предметное 75x25 мм для инверсной печати с углами 45 градусов и с колорированным краем голубого цвета

Стекло предметное 75x25 мм для инверсной печати со шлифованной кромкой и с колорированным краем: белым, голубым, зеленым, лиловым, оранжевым, розовым, коричневым, желтым.

Предметное стекло является местом размещения образца гистологического, цитологического и другого вида материала с целью его последующей окраски и микроскопии. Предметное стекло стандартного размера, используется в ручных и аппаратных методах окраски. Имеет шлифованную кромку и колорированный край для инверсной печати. Стекла имеют гладкую поверхность, высокую степень очистки, прозрачные. Шлифованная кромка обеспечивает комфорт и защиту для пальцев лаборанта при работе со стеклами, шлифованный край в отличие от обрезного края не «врезается» в пальцы и не травмирует кожу при длительной работе со стеклами. Колорированный край является, с одной стороны, полем для записи, а с другой стороны, разноцветные края стекол позволяют систематизировать и классифицировать препараты на стеклах.

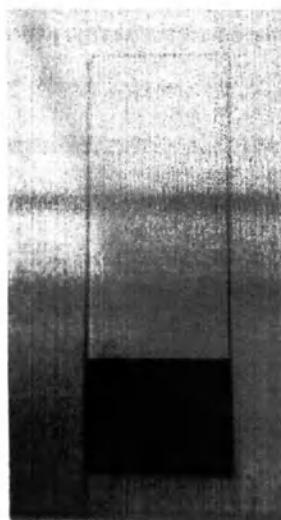


Рисунок 1.14 - Стекло предметное 75x25 мм для инверсной печати со шлифованной кромкой и колорированным краем оранжевого цвета

Стекло предметное 75x25 мм для инверсной печати со скошенной кромкой и углами 45 градусов, с колорированным краем: белым, голубым, зеленым, лиловым, оранжевым, розовым, коричневым, желтым.

Предметное стекло является местом размещения образца гистологического, цитологического и другого вида материала с целью его последующей окраски и микроскопии. Предметное стекло стандартного размера, используется в ручных и аппаратных методах окраски. Имеет углы по 45 градусов и колорированный край для инверсной печати, а также скошенную кромку для более комфортного и безопасного обращения лаборанта со стеклами в повседневной работе. Стекла имеют гладкую поверхность, высокую степень очистки, прозрачные. Имеют колорированный край, который является, с одной стороны, полем для записи, а с другой стороны, разноцветные края стекол позволяют систематизировать и классифицировать препараты на стеклах.

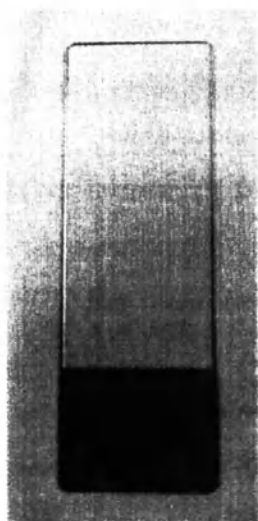


Рисунок 1.15 - Стекло предметное 75x25 мм для инверсной печати со скошенной кромкой и углами 45 градусов с колорированным краем зеленого цвета

Стекло предметное 75x25 мм с лункой

Варианты исполнения: с 1 лункой, с 1 лункой и адгезивным покрытием PCL для термотрансферных принтеров, с 1 лункой и адгезивным покрытием PCL для струйных принтеров, с 1 лункой и адгезивным покрытием PCL для инверсной печати; с 2 лунками, с 2 лунками и адгезивным покрытием PCL для термотрансферных принтеров, с 2 лунками и адгезивным покрытием PCL для струйных принтеров, с 2 лунками и адгезивным покрытием PCL для инверсной печати.

Предметное стекло является местом размещения образца гистологического, цитологического и другого вида материала с целью его последующей окраски и микроскопии. Предметное стекло стандартного размера с лункой, используется для некоторых специфичных методов исследования. Стекла имеют высокую степень очистки, прозрачные. Могут иметь несколько вариантов исполнения в различных комбинациях: 1 или 2 лунки для помещения образца материала; наличие адгезивного покрытия,

обеспечивающего надежное прилипание образца материала к поверхности стекла, что является дополнительной защитой от потери образца.



Рисунок 1.16 - Стекло предметное 75x25 мм с двумя лунками

Стекло предметное 75x25 мм с предначертанными диаметрами со шлифованной кромкой

Варианты исполнения: с 1 диаметром, с 1 диаметром и адгезивным покрытием PCL для термотрансферных принтеров, с 1 диаметром и адгезивным покрытием PCL для струйных принтеров, с 1 диаметром и адгезивным покрытием PCL для инверсной печати; с углами 45 градусов: с 1 диаметром, с 1 диаметром и адгезивным покрытием PCL для термотрансферных принтеров, с 1 диаметром и адгезивным покрытием PCL для струйных принтеров, с 1 диаметром и адгезивным покрытием PCL для инверсной печати; с 2 диаметрами, с 2 диаметрами и адгезивным покрытием PCL для термотрансферных принтеров, с 2 диаметрами и адгезивным покрытием PCL для струйных принтеров, с 2 диаметрами и адгезивным покрытием PCL для инверсной печати; с углами 45 градусов: с 2 диаметрами, с 2 диаметрами и адгезивным покрытием PCL для термотрансферных принтеров, с 2 диаметрами и адгезивным покрытием PCL для струйных принтеров, с 2 диаметрами и адгезивным покрытием PCL для инверсной печати.

Предметное стекло является местом размещения образца гистологического, цитологического и другого вида материала с целью его последующей окраски и микроскопии. Предметное стекло стандартного размера с предначертанным диаметром, используется для удобства лаборанта, так как помогают ориентировать образец материала, а также осуществлять визуальный контроль исследования. Стекла имеют высокую степень очистки, прозрачные. Имеют шлифованную кромку, обеспечивающую комфорт и защиту для пальцев лаборанта при работе со стеклами, шлифованный край в отличие от обрезного края не «врезается» в пальцы и не травмирует кожу при длительной работе со стеклами.

Могут иметь несколько вариантов исполнения в различных комбинациях: 1 или 2 диаметра для образца материала; наличие адгезивного покрытия, обеспечивающего надежное прилипание образца материала к поверхности стекла, что является дополнительной защитой от потери образца; углы 45 градусов для удобства использования в принтерах; колорированный край для термотрансферных принтеров; колорированный край для струйных принтеров; колорированный край для инверсной печати. По истечению срока годности стекла с адгезивным покрытием могут быть использованы как обычные предметные стекла без покрытия.

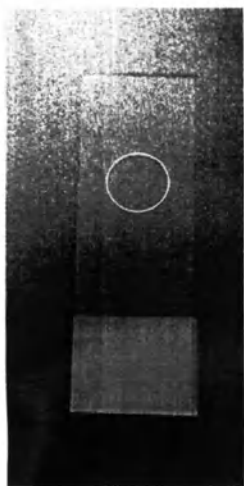


Рисунок 1.17 - Стекло предметное 75x25 мм с предначертанными диаметрами со шлифованной кромкой

Стекло предметное 75x25 мм с адгезивным покрытием PCL для термотрансферных принтеров

Варианты исполнения: со шлифованной кромкой с колорированным краем: белым, голубым, зеленым, лиловым, оранжевым, розовым, коричневым, желтым; со скошенной кромкой и углами 45 градусов с колорированным краем: белым, голубым, зеленым, лиловым, оранжевым, розовым, коричневым, желтым; со шлифованной кромкой и углами 45 градусов с колорированным краем: белым, голубым, зеленым, лиловым, оранжевым, розовым, коричневым, желтым.

Предметное стекло является местом размещения образца гистологического, цитологического и другого вида материала с целью его последующей окраски и микроскопии. Предметное стекло стандартного размера, используется в ручных и аппаратных методах окраски. Стекла имеют гладкую поверхность, высокую степень очистки, прозрачные. Адгезивное покрытие обеспечивает надежное прилипание образца материала к поверхности стекла, что является дополнительной защитой от потери образца. Стекла имеют колорированный край для печати на термотрансферном принтере. Могут иметь несколько вариантов исполнения в различных комбинациях: шлифованная кромка обеспечивает комфорт и защиту для пальцев лаборанта при работе со стеклами,

шлифованный край в отличие от обрезного края не «врезается» в пальцы и не травмирует кожу при длительной работе со стеклами; скошенная кромка предназначена для более комфортного и безопасного обращения лаборанта со стеклами в повседневной работе; наличие углов в 45 градусов для удобного использования в принтерах для маркировки; колорированный край является, с одной стороны, полем для записи, а с другой стороны, разноцветные края стекол позволяют систематизировать и классифицировать препараты на стеклах. По истечению срока годности стекло может быть использовано как обычное предметное стекло без покрытия.



Рисунок 1.18 - Стекло предметное 75x25 мм с адгезивным покрытием PCL для термотрансферных принтеров, со шлифованной кромкой и колорированным краем белого цвета

Стекло предметное 75x25 мм с адгезивным покрытием PCL для струйных принтеров

Варианты исполнения: со шлифованной кромкой с колорированным краем: белым, голубым, зеленым, лиловым, оранжевым, розовым, коричневым, желтым; со скошенной кромкой и углами 45 градусов с колорированным краем: белым, голубым, зеленым, лиловым, оранжевым, розовым, коричневым, желтым; со шлифованной кромкой и углами 45 градусов с колорированным краем: белым, голубым, зеленым, лиловым, оранжевым, розовым, коричневым, желтым.

Предметное стекло является местом размещения образца гистологического, цитологического и другого вида материала с целью его последующей окраски и микроскопии. Предметное стекло стандартного размера, используется в ручных и аппаратных методах окраски. Стекла имеют гладкую поверхность, высокую степень очистки, прозрачные. Адгезивное покрытие обеспечивает надежное прилипание образца материала к поверхности стекла, что является дополнительной защитой от потери образца. Стекла имеют колорированный край для печати на струйном принтере. Могут иметь несколько вариантов исполнения в различных комбинациях: шлифованная кромка

обеспечивает комфорт и защиту для пальцев лаборанта при работе со стеклами, шлифованный край в отличие от обрезного края не «врезается» в пальцы и не травмирует кожу при длительной работе со стеклами; скошенная кромка предназначена для более комфортного и безопасного обращения лаборанта со стеклами в повседневной работе; наличие углов в 45 градусов для удобного использования в принтерах для маркировки; колорированный край является, с одной стороны, полем для записи, а с другой стороны, разноцветные края стекол позволяют систематизировать и классифицировать препараты на стеклах. По истечению срока годности стекло может быть использовано как обычное предметное стекло без покрытия.



Рисунок 1.19 - Стекло предметное 75x25 мм с адгезивным покрытием PCL для струйных принтеров, со шлифованной кромкой и колорированным краем белого цвета

Стекло предметное 75x25 мм с адгезивным покрытием PCL для инверсной печати

Варианты исполнения: со шлифованной кромкой и колорированным краем: белым, голубым, зеленым, лиловым, оранжевым, розовым, коричневым, желтым; со скошенной кромкой и углами 45 градусов с колорированным краем: белым, голубым, зеленым, лиловым, оранжевым, розовым, коричневым, желтым; со шлифованной кромкой и углами 45 градусов с колорированным краем: белым, голубым, зеленым, лиловым, оранжевым, розовым, коричневым, желтым.

Предметное стекло является местом размещения образца гистологического, цитологического и другого вида материала с целью его последующей окраски и микроскопии. Предметное стекло стандартного размера, используется в ручных и аппаратных методах окраски. Стекла имеют гладкую поверхность, высокую степень очистки, прозрачные. Адгезивное покрытие обеспечивает надежное прилипание образца материала к поверхности стекла, что является дополнительной защитой от потери образца. Стекла имеют колорированный край для инверсной печати. Могут иметь несколько вариантов исполнения в различных комбинациях: шлифованная кромка обеспечивает

комфорт и защиту для пальцев лаборанта при работе со стеклами, шлифованный край в отличие от обрезаемого края не «врезается» в пальцы и не травмирует кожу при длительной работе со стеклами; скошенная кромка предназначена для более комфортного и безопасного обращения лаборанта со стеклами в повседневной работе; наличие углов в 45 градусов для удобного использования в принтерах для маркировки; колорированный край является, с одной стороны, полем для записи, а с другой стороны, разноцветные края стекол позволяют систематизировать и классифицировать препараты на стеклах. По истечению срока годности стекло может быть использовано как обычное предметное стекло без покрытия.



Рисунок 1.20 - Стекло предметное 75x25 мм с адгезивным покрытием PCI для инверсной печати, со шлифованной кромкой и колорированным краем белого цвета

Стекло предметное 75x25 мм с адгезивным покрытием PCI для термотрансферных принтеров

Варианты исполнения: со шлифованной кромкой с колорированным краем: белым, голубым, зеленым, лиловым, оранжевым, розовым, коричневым, желтым; со скошенной кромкой и углами 45 градусов с колорированным краем: белым, голубым, зеленым, лиловым, оранжевым, розовым, коричневым, желтым; со шлифованной кромкой и углами 45 градусов с колорированным краем: белым, голубым, зеленым, лиловым, оранжевым, розовым, коричневым, желтым.

Предметное стекло является местом размещения образца гистологического, цитологического и другого вида материала с целью его последующей окраски и микроскопии. Предметное стекло стандартного размера, используется в ручных и аппаратных методах окраски. Стекла имеют гладкую поверхность, высокую степень очистки, прозрачные. Адгезивное покрытие обеспечивает надежное прилипание образца материала к поверхности стекла, что является дополнительной защитой от потери образца. Стекла имеют колорированный край для печати на термотрансферном принтере. Могут иметь несколько вариантов исполнения в различных комбинациях: шлифованная кромка

обеспечивает комфорт и защиту для пальцев лаборанта при работе со стеклами, шлифованный край в отличие от обрезного края не «врезается» в пальцы и не травмирует кожу при длительной работе со стеклами; скошенная кромка предназначена для более комфортного и безопасного обращения лаборанта со стеклами в повседневной работе; наличие углов в 45 градусов для удобного использования в принтерах для маркировки; колорированный край является, с одной стороны, полем для записи, а с другой стороны, разноцветные края стекол позволяют систематизировать и классифицировать препараты на стеклах. По истечению срока годности стекло может быть использовано как обычное предметное стекло без покрытия.

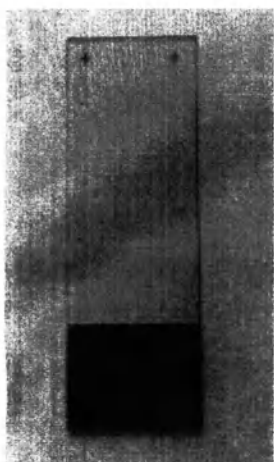


Рисунок 1.21 - Стекло предметное 75x25 мм с адгезивным покрытием PCI для термотрансферных принтеров, со шлифованной кромкой и колорированным краем розового цвета

Стекло предметное 75x25 мм с адгезивным покрытием PCI для струйных принтеров

Варианты исполнения: со шлифованной кромкой с колорированным краем: белым, голубым, зеленым, лиловым, оранжевым, розовым, коричневым, желтым; со скошенной кромкой и углами 45 градусов с колорированным краем: белым, голубым, зеленым, лиловым, оранжевым, розовым, коричневым, желтым; со шлифованной кромкой и углами 45 градусов с колорированным краем: белым, голубым, зеленым, лиловым, оранжевым, розовым, коричневым, желтым.

Предметное стекло является местом размещения образца гистологического, цитологического и другого вида материала с целью его последующей окраски и микроскопии. Предметное стекло стандартного размера, используется в ручных и аппаратных методах окраски. Стекла имеют гладкую поверхность, высокую степень очистки, прозрачные. Адгезивное покрытие обеспечивает надежное прилипание образца материала к поверхности стекла, что является дополнительной защитой от потери образца. Стекла имеют колорированный край для печати на струйном принтере. Могут иметь несколько вариантов исполнения в различных комбинациях: шлифованная кромка обеспечивает комфорт и защиту для пальцев лаборанта при работе со стеклами,

шлифованный край в отличие от обрезного края не «врезается» в пальцы и не травмирует кожу при длительной работе со стеклами: скошенная кромка предназначена для более комфортного и безопасного обращения лаборанта со стеклами в повседневной работе; наличие углов в 45 градусов для удобного использования в принтерах для маркировки; колорированный край является, с одной стороны, полем для записи, а с другой стороны, разноцветные края стекол позволяют систематизировать и классифицировать препараты на стеклах. По истечению срока годности стекло может быть использовано как обычное предметное стекло без покрытия.

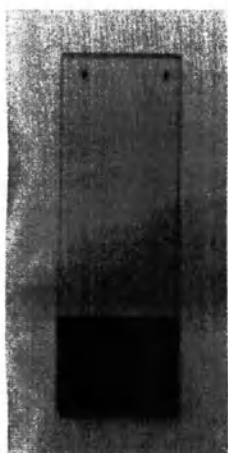


Рисунок 1.22 - Стекло предметное 75x25 мм с адгезивным покрытием PSI для струйных принтеров, со шлифованной кромкой и колорированным краем оранжевого цвета

Стекло предметное 75x25 мм с адгезивным покрытием PSI для инверсной печати

Варианты исполнения: со шлифованной кромкой и колорированным краем: белым, голубым, зеленым, лиловым, оранжевым, розовым, коричневым, желтым; со скошенной кромкой и углами 45 градусов с колорированным краем: белым, голубым, зеленым, лиловым, оранжевым, розовым, коричневым, желтым; со шлифованной кромкой и углами 45 градусов с колорированным краем: белым, голубым, зеленым, лиловым, оранжевым, розовым, коричневым, желтым.

Предметное стекло является местом размещения образца гистологического, цитологического и другого вида материала с целью его последующей окраски и микроскопии. Предметное стекло стандартного размера, используется в ручных и аппаратных методах окраски. Стекла имеют гладкую поверхность, высокую степень очистки, прозрачные. Адгезивное покрытие обеспечивает надежное прилипание образца материала к поверхности стекла, что является дополнительной защитой от потери образца. Стекла имеют колорированный край для инверсной печати. Могут иметь несколько вариантов исполнения в различных комбинациях: шлифованная кромка обеспечивает комфорт и защиту для пальцев лаборанта при работе со стеклами, шлифованный край в

отличие от обрезного края не «врезается» в пальцы и не травмирует кожу при длительной работе со стеклами; скошенная кромка предназначена для более комфортного и безопасного обращения лаборанта со стеклами в повседневной работе; наличие углов в 45градусов для удобного использования в принтерах для маркировки; колорированный край является, с одной стороны, полем для записи, а с другой стороны, разноцветные края стекол позволяют систематизировать и классифицировать препараты на стеклах. По истечению срока годности стекло может быть использовано как обычное предметное стекло без покрытия.

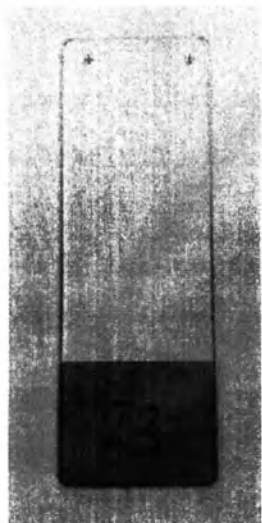


Рисунок 1.23 - Стекло предметное 75x25 мм с адгезивным покрытием PCI для инверсной печати, со шлифованной кромкой и колорированным краем голубого цвета

2.2. Материал

Предметные стекла:

Изготовлены из высококачественного сырья, гидrolитического стекла I класса, не имеют вкраплений и оптических искажений. Стёкла устойчивы к воздействию химических реагентов, традиционно применяемых в лаборатории. Стекла предварительно очищено и обезжирено. Адгезивные стекла имеют электростатическое покрытие, которое улучшает контакт препарата с предметным стеклом. Предметные стекла не влияют на ферментативную предварительную обработку. Устойчивы к нагреванию (до 100°C).

3. Аналитические характеристики

Стёкла предметные всех вышеперечисленных типов используются для любых видов лабораторных исследований и работ с цитологическим, гистологическим и другим видом материала, предполагающих применение микроскопии. Образец биоматериала после необходимой подготовки помещается в центр предметного стекла (или в специальные лунки, диаметры для стекол при наличии таковых). Далее проводится окраска материала в соответствии с выбранной методикой. После окраски препарат подсушивают на воздухе и

закрывают под покровное стекло при помощи монтирующей среды. Подготовленный таким образом препарат можно микроскопировать и/или архивировать.

4. Меры предосторожности

При работе со стеклами для проведения микроскопических исследований следует соблюдать правила безопасной работы, меры личной гигиены.

Работу проводить в одноразовых резиновых перчатках. Запрещается хранение и прием пищи на рабочем месте.

При работе со стеклами для проведения микроскопических исследований следует соблюдать требования безопасности, нормативные и правовые акты той страны, в которой используется данное медицинское изделие.

5. Подготовка к работе

Все вышеперечисленные типы стекол для проведения микроскопических исследований являются изделиями одноразового использования и не требуют специальной подготовки к работе.

Стекло полностью готово к использованию и не нуждается в дополнительной обработке (мытьё и обезжиривании). При необходимости увеличения адгезивных свойств на предметное стекло нанести адгезивное покрытие согласно инструкции к используемому средству.

В целях соблюдения гигиены и защиты оператора при работе с предметными стеклами использовать одноразовые перчатки.

При работе с цитологическим материалом использовать шпатели для растяжки мазков с целью получения качественных препаратов. При работе с гистологическим материалом срезы наносить непосредственно на стекло, предварительно поместив на него каплю тёплой воды, или при помощи водяной бани для расправления срезов.

Нанесение идентификационных надписей на стекло предметное с матовым полем или колорированным краем возможно при помощи перманентных маркеров, специальных механических и электрических приспособлений.

6. Проведение анализа

Стекла предметные всех вышеперечисленных типов используются для любых видов лабораторных исследований и работ с цитологическим, гистологическим и другим видом материала, предполагающих применение микроскопии.

Маркировка: в случае необходимости на предметное стекло с матовым полем или флорированным краем наносится идентификационная надпись с помощью карандаша, перманентного маркера, принтера для маркировки стекол (струйного, термотрансферного, или инверсной печати).

Образец биоматериала после необходимой подготовки помещается в центр предметного стекла, либо в специальные лунки, либо в диаметры, в случае использования стекол с лунками/диаметрами.

При необходимости увеличения адгезивных свойств на предметное стекло нанести адгезивное покрытие согласно инструкции к используемому средству.

Рекомендуется использовать дополнительные специальные инструменты для размещения биоматериала на стекле: шпатели, пинцеты, иглы.

Окраска материала проводится в соответствии с выбранной методикой/-ами ручным или аппаратным способом.

После окраски препарат подсушивают на воздухе и заключают под покровное стекло при помощи синтетической, водорастворимой среды для заключения или канадского бальзама. Для этого одну каплю среды (если производителем не рекомендовано иначе) наносят на препарат на предметном стекле и накрывают стеклом покровным, избегая образования пузырьков воздуха. Подсушивают на воздухе* (*методики могут быть различны в зависимости от характера монтирующей среды).

4. Микроскопируют препарат.

5. Архивируют, используя специальные планшеты, контейнеры, архивные системы, архивные шкафы.

7. Условия хранения и эксплуатации стекол для проведения микроскопических исследований

Все вышеперечисленные типы предметных стекол не имеют особых требований по эксплуатации и хранению.

Необходимо учитывать общие правила обращения с изделиями, изготовленными из стекла: не подвергать грубому механическому воздействию, хранить в статическом безопасном месте и соблюдать меры предосторожности, предписанные в п.4.

Особые условия хранения необходимо учитывать в случае уже готового гистологического или цитологического препарата: изделия рекомендуется хранить вдали от прямых солнечных лучей, источников тепла и открытого огня.

Стекла предметные для микроскопических исследований являются нестерильными медицинскими изделиями.

Средний срок службы всех вышеперечисленных предметных стекол не ограничен, за исключением стекол с адгезивом (PCL, PCI), на эти стекла установлен срок годности 18 месяцев. По истечению срока годности стекол предметных с адгезивным покрытием данные стекла могут быть использованы как обычные предметные стекла без покрытия.

8. Требования охраны окружающей среды. Условия утилизации.

Все вышеперечисленные стекла для проведения микроскопических исследований являются чистыми товарами и безопасными для окружающей среды.

Все вышеперечисленные стекла после проведения микроскопических исследований требуют особых условий утилизации. Перед утилизацией подлежат обязательной дезинфекции химическим способом, либо любым способом, доступным для пользователя.

Утилизируются в соответствии с установленными нормами по утилизации той страны, в которой данные товары используются.

9. Маркировка товара

Этикетка к представленным стеклам для проведения микроскопических исследований содержит следующую информацию: артикул, наименование, фасовку, номер партии (LOT), информационные знаки*, качественную информацию о товаре (наличие шлифованного края, матовой полосы, колорированного края и его цвет, адгезивного покрытия (PCL, PCI), скошенной кромки, углов 45 градусов, наличия лунок, диаметров, принадлежность к определенному виду принтера), дату выпуска, условия хранения, информацию о производителе и поставщике, контактную информацию в случае рекламаций.

*



«Беречь от влаги»



«Хрупкое. Осторожно»

10. Гарантия производителя

По вопросам, касающимся качества стекол предметных для проведения микроскопических исследований, следует обращаться по адресу Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Большой проспект В.О., дом 68, лит. А., тел. +7 (812) 305 0606


11. Наличие международных сертификатов и деклараций

Стекла предметные для микроскопических исследований имеют следующие сертификаты:

EN ISO13485:2003

EN ISO 9001:2008

CE IVD Directive 98/79/EEC

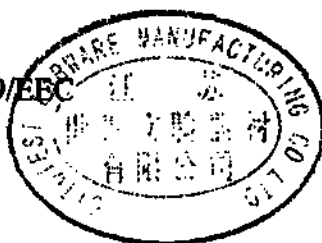

公 证 书

(2015)宁南证经外字第426号

申请人：江苏世泰实验器材有限公司，住所：海门市海门镇新秀路48号，法定代表人：王忠，男，一九六二年十二月二十九日出生，公民身份号码：320625196212291877。

公证事项：印鉴

兹证明前面的江苏世泰实验器材有限公司于二〇一五年四月三日出具的外文文件的原件上江苏世泰实验器材有限公司的印鉴属实。

中华人民共和国江苏省南京市南京公证处

公证员

李巧宝

二〇一五年四月三日



1175090646

NOTARIAL CERTIFICATE

(2015)NNZ.JW.Zi,No.426

Applicant: CITOTEST LABWARE MANUFACTURING CO., LTD., Address: No. 48, Xinxu Road, Haimen Town, Haimen City, Legal Representative: Wang Zhong, male, born on December 29, 1962, Citizen ID No. 320625196212291877.

Issue under notarization: seal

This is to certify that the seals of CITOTEST LABWARE MANUFACTURING CO., LTD. affixed to the forgoing original copy of the foreign document issued by CITOTEST LABWARE MANUFACTURING CO., LTD. on April 3, 2015 are authentic.

Notary: Li Qiaobao(Signature)

Nanjing Notary Public Office

Nanjing City, Jiangsu Province

The People's Republic of China(Seal)

Apr.10, 2015

1175090647

公 证 书

(2015)宁南证经外字第427号

申请人：江苏世泰实验器材有限公司，住所：海门市海门镇新秀路48号，法定代表人：王忠，男，一九六二年十二月二十九日出生，公民身份号码：320625196212291877。

公证事项：译本内容与原本内容相符

兹证明前面的英文译本与(2015)宁南证经外字第426号公证书中中文原本内容相符。

中华人民共和国江苏省南京市南京公证处

公证员

李巧宝

二〇一五年四月廿四日



1175090648

NOTARIAL CERTIFICATE

(2015)NNZ.JW.Zi,No.427

Applicant: CITOTEST LABWARE MANUFACTURING CO., LTD., Address: No. 48, Xinxu Road, Haimen Town, Haimen City, Legal Representative: Wang Zhong, male, born on December 29, 1962, Citizen ID No. 320625196212291877.

Issue under notarization: true and exact translation

This is to certify that the English translation of the Notarial Certificate (2015)NNZ.JW.Zi,No.426 attached hereto is in conformity with the Chinese original.

Notary: Li Qiaobao(Signature)

Nanjing Notary Public Office

Nanjing City, Jiangsu Province

The People's Republic of China(Seal)

Apr.10, 2015

1175090649

[Перевод с английского и китайского языков на русский язык]

НОТАРИАЛЬНОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ

[Рельефная печать:

Нотариус

Нотариальная контора Наньцзин, г. Наньцзин, провинция Цзянсу
Китайская Народная Республика]

**НОТАРИАЛЬНАЯ КОНТОРА НАНЬЦЗИН, Г. НАНЬЦЗИН, ПРОВИНЦИЯ
ЦЗЯНСУ, КИТАЙСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА**

[Перевод надписей и печатей на документе «Инструкция по применению медицинского изделия. Стекла предметные для микроскопических исследований», представленном на русском языке, а также нотариальных удостоверений на английском и китайском языках. Текст нотариальных удостоверений на китайском языке соответствует тексту на английском языке.]

Утверждено

Генеральным директором компании «ЦИТОТЕСТ ЛЭБВЭА МЭНЬЮФЭКЧЕРИНГ КО., ЛТД»

Ван Чжун

03 апреля 2015 г.

[Печать компании «Цитотест Лэбвэа Мэньюфэкчеринг Ко., Лтд»]

НОТАРИАЛЬНОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ

(2015) NNZ.JW.Zi, № 426

Заявитель: «ЦИТОТЕСТ ЛЭБВЭА МЭНЬЮФЭКЧЕРИНГ КО., ЛТД.», адрес: № 48, Синьсю Роуд, г. Хаймэнь, Хаймэнь, законный представитель: Ван Чжун, пол: мужской, 29 декабря 1962 г.р., удостоверение личности №: 320625196212291877.

Предмет нотариального удостоверения: печать.

Настоящим удостоверяется, что печать компании «ЦИТОТЕСТ ЛЭБВЭА МЭНЬЮФЭКЧЕРИНГ КО., ЛТД.», поставленная на приведенном выше оригинале иностранного документа, выданного компанией «ЦИТОТЕСТ ЛЭБВЭА МЭНЬЮФЭКЧЕРИНГ КО., ЛТД.» 03 апреля 2015 г., является подлинной.

Нотариус: Ли Цяобао

Нотариальная контора Наньцзин, г. Наньцзин, провинция Цзянсу
Китайская Народная Республика

/подпись/

10 апреля 2015 г.

[Печать:

Нотариус: Ли Цяобао

Нотариальная контора Наньцзин, г. Наньцзин, провинция Цзянсу
Китайская Народная Республика]

НОТАРИАЛЬНОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ

(2015) NNZ.JW.Zi, № 426

Заявитель: «ЦИТОТЕСТ ЛЭБВЭА МЭНЬЮФЭКЧЕРИНГ КО., ЛТД.», адрес: № 48, Синьсю Роуд, г. Хаймэнь, Хаймэнь, законный представитель: Ван Чжун, пол: мужской, 29 декабря 1962 г.р., удостоверение личности №: 320625196212291877.

Предмет нотариального удостоверения: печать.

Настоящим удостоверяется, что печать компании «ЦИТОТЕСТ ЛЭБВЭА МЭНЬЮФЭКЧЕРИНГ КО., ЛТД.», поставленная на приведенном выше оригинале иностранного документа, выданного компанией «ЦИТОТЕСТ ЛЭБВЭА МЭНЬЮФЭКЧЕРИНГ КО., ЛТД.» 03 апреля 2015 г., является подлинной.

Нотариус: Ли Цяобао (подпись)

Нотариальная контора Наньцзин, г. Наньцзин, провинция Цзянсу

Китайская Народная Республика (печать)

10 апреля 2015 г.

НОТАРИАЛЬНОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ

(2015) NNZ.JW.Zi, № 427

Заявитель: «ЦИТОТЕСТ ЛЭБВЭА МЭНЬЮФЭКЧЕРИНГ КО., ЛТД.», адрес: № 48, Синьсю Роуд, г. Хаймэнь, Хаймэнь, законный представитель: Ван Чжун, пол: мужской, 29 декабря 1962 г.р., удостоверение личности №: 320625196212291877.

Предмет нотариального удостоверения: верный и точный перевод.

Настоящим удостоверяется, что прилагаемый перевод на английский язык Нотариального удостоверения (2015) NNZ.JW.Zi, № 426 соответствует оригиналу на китайском языке.

Нотариус: Ли Цяобао

Нотариальная контора Наньцзин, г. Наньцзин, провинция Цзянсу

Китайская Народная Республика

/подпись/

10 апреля 2015 г.

[Печать:

Нотариус: Ли Цяобао

Нотариальная контора Наньцзин, г. Наньцзин, провинция Цзянсу

Китайская Народная Республика]

НОТАРИАЛЬНОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ

(2015) NNZ.JW.Zi, № 427

Заявитель: «ЦИТОТЕСТ ЛЭБВЭА МЭНЬЮФЭКЧЕРИНГ КО., ЛТД.», адрес: № 48, Синьсю Роуд, г. Хаймэнь, Хаймэнь, законный представитель: Ван Чжун, пол: мужской, 29 декабря 1962 г.р., удостоверение личности №: 320625196212291877.

Предмет нотариального удостоверения: верный и точный перевод.

Настоящим удостоверяется, что прилагаемый перевод на английский язык Нотариального удостоверения (2015) NNZ.JW.Zi, № 426 соответствует оригиналу на китайском языке.

Нотариус: Ли Цяобао (подпись)

Нотариальная контора Наньцзин, г. Наньцзин, провинция Цзянсу

Китайская Народная Республика (печать)

10 апреля 2015 г.

Перевел Гасанов Султан Гасанович



Город Москва.

Двадцать третьего апреля две тысячи пятнадцатого года.

Я, Лущикова Ирина Анатольевна, нотариус города Москвы, свидетельствую подлинность подписи, сделанной переводчиком Гасановым Султаном Гасановым в моем присутствии. Личность его установлена.

Зарегистрировано в реестре за № 4-921

Взыскан тариф — 100 рублей

Нотариус



Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 34 лист(-а,-ов).

Нотариус

69

Город Москва
23 АПР 2015

Я, Лущикова Ирина Анатольевна, нотариус города Москвы, свидетельствую верность этой копии с подлинником документа. В последнем подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неопределенных исправлений или каких-либо особенностей нет. Мною, лицу, обратившемуся за совершением нотариального действия, разъяснено, что при свидетельствовании верности копии документа не подтверждается законность содержания документа и соответствие изложенных в нем фактов действительности.

Зарегистрировано в реестре за № 4-922

Взыскано по тарифу 100 руб (134 руб)



Всего прошито, пронумеровано,
пронумеровано и скреплено
печатью 36 листов.
Нотариус: