

ООО «МебельПром»

Российская федерация, 607650, Нижегородская обл., г. Кстово, пл. Ленина,
дом 5а, офис 617, тел. 8(831)4524611, ОГРН 1135250001512, ИНН/КПП
5250058404/525001001 e-mail: Mebelprom.nn@yandex.ru



Инструкция по эксплуатации и сборке (Паспорт)

Набор мебели медицинской для кабинетов и
палат по ТУ 32.50.30-002-25549916-2017

СТОЛ ПЕЛЕНАЛЬНЫЙ ТВ-СПЛ-01, ТВ-
СПЛ-02



Нижегородская область, г. Кстово, 2017

Инструкция по эксплуатации и сборке (ПАСПОРТ) медицинского изделия
СТОЛ ПЕЛЕНАЛЬНЫЙ ТВ-СПЛ-01, ТВ-СПЛ-02 производства ООО «МебельПром»

ТУ 32.50.30–002–25549916–2017

РУ _____

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

К сборке и эксплуатации стола допускаются лица, внимательно изучившие настоящее описание и конструкцию изделия.

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1. Назначение медицинского изделия - для оснащения медицинских лабораторий, лечебно-профилактических учреждений, а именно: для хранения реактивов, хранения медицинских инструментов, реагентов, для размещения лабораторных приборов и медицинских изделий, размещения пациентов в смотровых и массажных кабинетах, а также для организации работы медицинского персонала и лабораторного применения.

1.2. Стол пеленальный ТВ-СПЛ-01, ТВ-СПЛ-02 (далее по тексту — стол) предназначен для поддержания новорожденного или грудного ребенка во время пеленания (смены подгузников) в больнице/здравоохранительном учреждении. Изделие стационарное, снабжено ограничительными бортиками, местом для хранения.

Побочное действие и противопоказания: Не выявлены.

1.3. Стол изготавливается для эксплуатации при температуре окружающей среды от +10°C до +35°C и относительной влажности 80% при температуре +25°C.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Основные параметры и размеры.

2.2.1. Основные параметры и размеры стола указаны в таблицах 1-2.

Таблица 1. ТВ-СПЛ-01

Габаритные размеры (±5 мм)	Значение
Длина, мм	850
Ширина, мм	710
Высота, мм	940
Вес, кг	не более 29

Таблица 2. ТВ-СПЛ-02

Габаритные размеры (±5 мм)	Значение
Длина, мм	850
Ширина, мм	710
Высота, мм	960
Вес, кг	не более 15

2.2.2. Функциональные размеры указаны в таблице 4.

Таблица 4.

Функциональные размеры (±5 мм)	Размеры (±5 мм)
Размеры рабочей плоскости	Длина: 850 мм, Ширина: 710 мм
Расстояние от пола до верхней кромки рабочей плоскости	940 мм

Расстояние от пола до нижней кромкой рабочей плоскости	834 мм
Расстояние от пола до верхней поверхности полки	470 мм
Расстояние от пола до нижней поверхности полки	454 мм

2.3. Характеристики:

2.3.1. Стол изготовлен по единой технологии в виде модульной сборно-разборной конструкции с использованием металлического профиля квадратного сечения. Столик состоит из короба, ножек и полки. Ножки изготовлены из стальной трубы квадратного сечения. Короб столика имеет ложе и бортики. Короб изготовлен из пластика. Полка изготовлена из ЛДСП. Сборка столика производится стандартных крепежных изделий.

2.3.2. Столик выдерживает предельную равномерно распределенную нагрузку на полку и столешницу не более 10 кг. Суммарная номинальная нагрузка на столик 20 кг

2.3.3. Упаковка соответствует характеру поставляемого Товара и способу транспортировки. Упаковка обеспечивает сохранность Товара при транспортировке, погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации, предохраняет груз от всякого рода повреждений, утраты товарного вида и коррозии при перевозке. Упаковка прочная, чистая, сухая, без нарушения целостности. Столы в упаковке транспортируются простыми транспортными средствами при температуре от -50°C до +50°C и относительной влажности 100% при температуре +25°C.

Хранение должно обеспечиваться при тех же условиях в сухих складских помещениях, исключающих воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред; воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию металла.

После транспортирования изделия в условиях отрицательных температур, перед распаковкой необходимо выдержать их в нормальных условиях не менее 2 часов.

Распаковать изделие и проверить целостность покрытия.

Проверить комплектность.

Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки наружных поверхностей (1-3% раствор хлорамина).

2.3.4. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных в технических условиях и указанных в настоящем паспорте.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию, гарантийный срок хранения 6 месяцев.

В течение гарантийного срока завод-изготовитель безвозмездно ремонтирует или заменяет изделие или его составные части в случае неисправности при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1. Комплект поставки стола соответствует указанному в таблице 5.

Таблица 5.

№	Наименование комплектующего	Количество, шт.	Размеры (±5 мм)
1	Короб	1	850x710
2	Ножка	2	680x834
3	Полка	1	820x630
4	Винт м5x35	8	
5	Болт м8x20	4	
6	Гайка м5	8	
7	Гайка м8	4	

8	Шайба 5	8	
9	Шайба 8	4	
10	Инструкция по эксплуатации и сборке	1	A4

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

- 4.1. Столик состоит из короба, ножек и полки.
- 4.2. Ножки изготовлены из стальной трубы квадратного сечения.
- 4.3. Короб столика имеет ложе и бортики. Короб изготовлен из пластика.
- 4.4. Полка изготовлена из ЛДСП.

5. ПОДГОТОВКА К СБОРКЕ

- 5.1. После транспортирования стола в условиях отрицательных температур, перед распаковкой необходимо выдержать его в нормальных температурных условиях не менее 2 часов. Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки наружных поверхностей (1-3% раствор хлорамина).
- 5.2. Распаковать стол и проверить целостность покрытия.
- 5.3. Проверить комплектность.
- 5.4. Осуществить сборку согласно инструкции.

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- 6.1. Техническое обслуживание включает в себя периодический осмотр целостности покрытий и проверку надежности резьбовых соединений. В случае ослабления резьбовых соединений необходимо затянуть их ключом.
- 6.2. Стол, в случае необходимости, дезинфицируют растворами, разрешенными для дезинфекционной обработки поверхностей, согласно «Методическим указаниям по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения» (утв. Минздравом РФ 30.12.1998 N МУ-287-113).

7. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

- 7.1. Стол в упаковке предприятия-изготовителя транспортируется крытыми транспортными средствами при температуре от -50°C до +50°C и относительной влажности 100% при температуре +25°C.
- 7.2. Хранение должно обеспечиваться при тех же условиях в сухих складских помещениях, исключающих воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред.

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- 8.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие стола требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных в технических условиях и указанных в настоящем паспорте.
- 8.2. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода стола в эксплуатацию, гарантийный срок хранения 6 месяцев.
- 8.3. В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель безвозмездно ремонтирует или заменяет изделие или его составные части в случае неисправности при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Стол пеленальный _____

Дата выпуска _____ М. П.

Соответствует ТУ _____ и признан годным к эксплуатации.

Подпись лиц, ответственных за приемку _____

10. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Изделие _____ - _____

наименование и тип изделия

дата выпуска

номер ТУ



Приобретено _____

дата, подпись, штамп торгующей организации

11. УТИЛИЗАЦИЯ

11.1. Для предотвращения загрязнённости окружающей среды все отходы, образующиеся при утилизации изделий и их частей, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией, в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» для отходов класса А.

Инструкция по сборке стола ТВ - СПЛ-01, ТВ-СПЛ-02

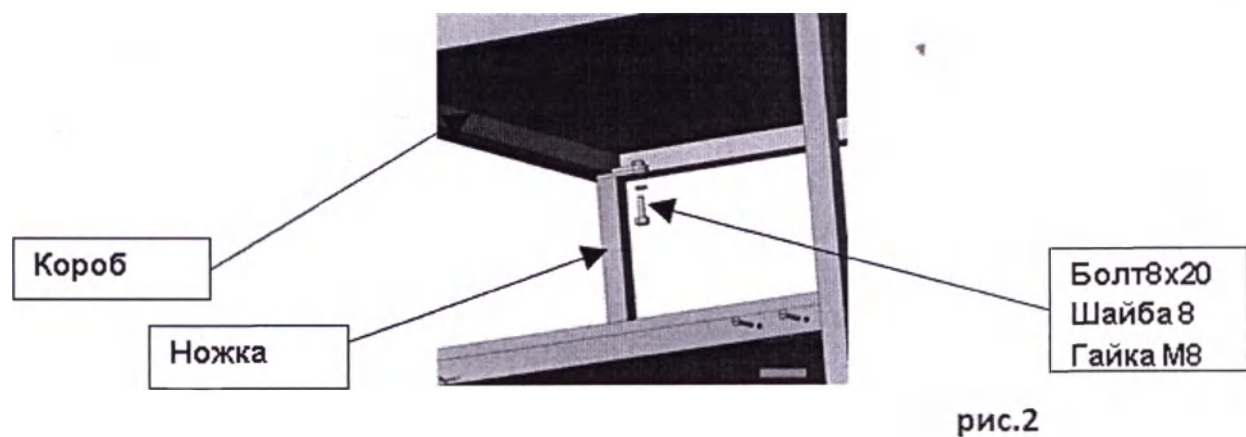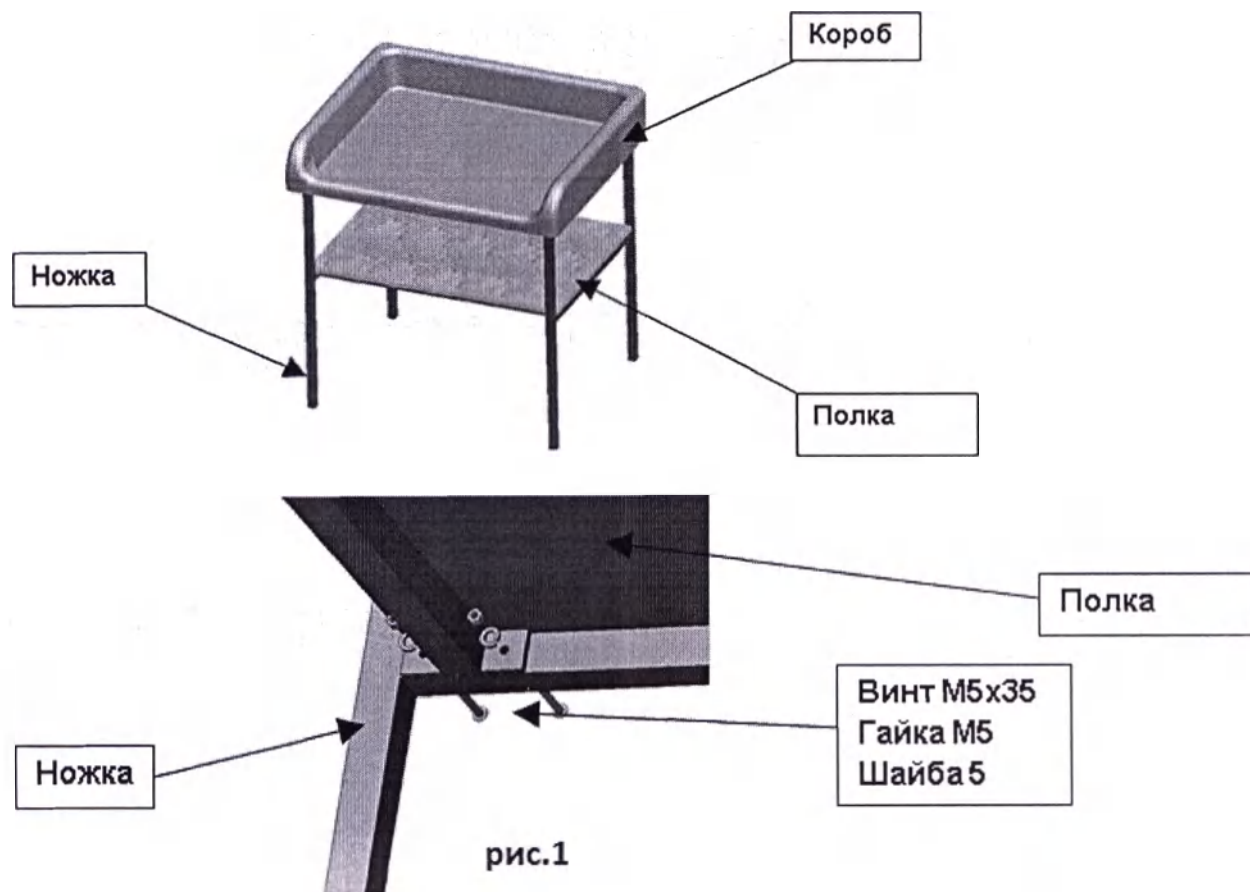

- 1) Соединить при помощи винтов M5x35, гаек M5 и шайб 5 ножки и полку (Рис.1).
- 2) Присоединить при помощи болтов M8x20, гаек M8 и шайб 8 ножки к коробу (рис.2).

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

6 (шесть) листа(ов)


Комаров Сергей Андреевич Ф.И.О.

[подпись] личная подпись



ООО «МебельПром»

Российская федерация, 607650, Нижегородская обл., г. Кстово, пл. Ленина,
дом 5а, офис 617, тел. 8(831)4524611, ОГРН 1135250001512, ИНН/КПП
5250058404/525001001 e-mail: Mebelprom.nn@yandex.ru

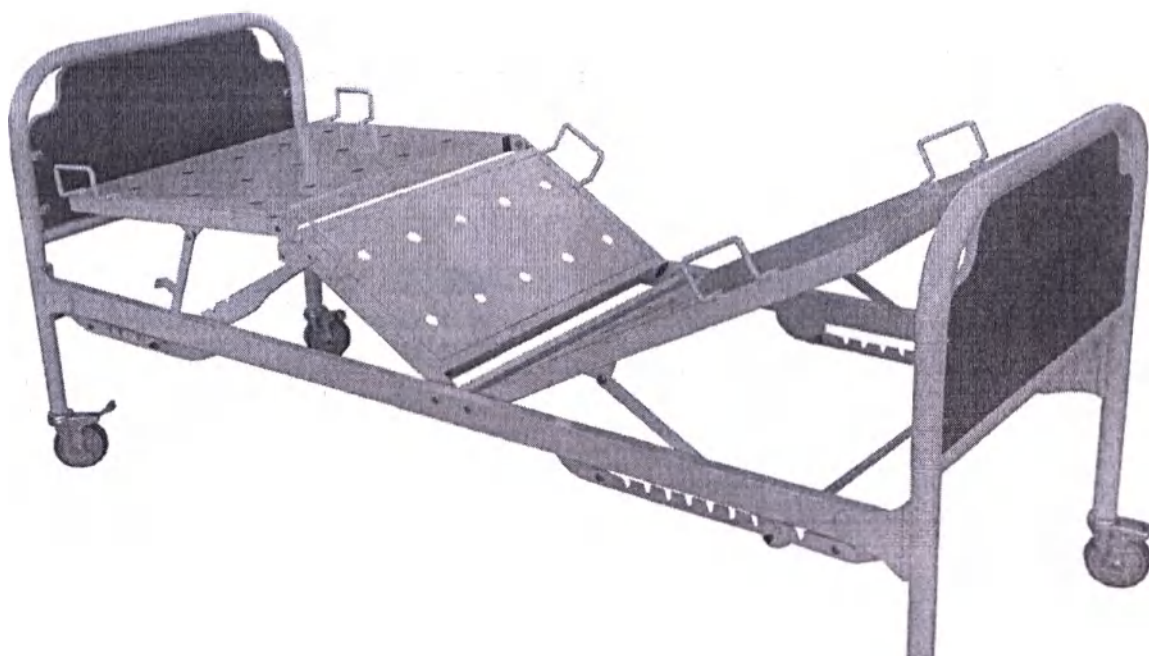

Инструкция по эксплуатации и сборке (Паспорт)

Набор мебели медицинской для кабинетов и
палат по ТУ 32.50.30–002–25549916–2017

Кровать функциональная
четырёхсекционная механическая

ТВ-КБ-02.02

КОПИЯ
ВЕРНА



Нижегородская область, г. Кстово, 2017

Инструкция по эксплуатации и сборке (ПАСПОРТ) медицинского изделия

Кровать функциональная четырехсекционная механическая ТВ-КБ-02.02 производства ООО «МебельПром»

ТУ 32.50.30-002-25549916-2017

РУ _____

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

К сборке и эксплуатации кровати допускаются лица, внимательно изучившие настоящее описание и конструкцию изделия.

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Назначение медицинского изделия - для оснащения медицинских лабораторий, лечебно-профилактических учреждений, а именно: для хранения реактивов, хранения медицинских инструментов, реагентов, для размещения лабораторных приборов и медицинских изделий, размещения пациентов в смотровых и массажных кабинетах, а также для организации работы медицинского персонала и лабораторного применения.

1.2 Кровать функциональная четырехсекционная механическая ТВ-КБ-02.02 (далее по тексту — кровать) предназначена для оснащения лечебно-профилактических учреждений, а именно: размещения пациентов в смотровых и массажных кабинетах..

Побочное действие и противопоказания: Не выявлены.

1.2. Кровать изготавливается для эксплуатации при температуре окружающей среды от +10°C до +35°C и относительной влажности 80% при температуре +25°C.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Основные параметры и размеры.

2.2.1. Основные параметры и размеры кровати указаны в таблице 1.

Таблица 1.

Габаритные размеры (±5 мм)	Значение
Длина, мм	2150
Ширина, мм	930
Высота, мм	850
Вес, кг	не более 43

2.2.2. Функциональные размеры указаны в таблице № 2.

Таблица 2.

Функциональные размеры (±5 мм)	Размеры (±5 мм)
Размер ложа	Длина: 2150 мм, Ширина: 930 мм, Высота спинки: 850 мм
Размер подголовника	Длина: 550 мм, Ширина: 850 мм
Угол наклона подголовника, в пределах	От 0 до 45°
Рекомендованный размер матраса	Длина: 2100 мм, Ширина: 900 мм
Высота от пола до ложа	550 мм

2.3. Характеристики:

2.3.1. Изделия изготовлены по единой технологии в виде сборно-разборной конструкции с использованием металлического профиля круглого и прямоугольного сечения, листового металла и металлической сетки.

2.3.2. Кровати выдерживают статическую равномерно распределенную по ложу нагрузку не более 120 кг.

2.3.3. Металлические детали имеют защитно-декоративное покрытие порошковой эпоксидно-полиэфирной краской, нетоксичной пожаробезопасной, устойчивой к ударам, сколам, средствам дезинфекционной обработки способом протирания, прошедшую обработку в термотонеле.

2.3.4. Покрытие металлических деталей соответствует требованиям ГОСТ 9.303 для группы условий эксплуатации I.

2.3.5. Покрытие металлических деталей выполнено по ГОСТ 9.032 для группы условий эксплуатации III климатического исполнения УХЛ 4.2, наружные поверхности выполнены не ниже IV класса, внутренние – не ниже VI класса.

2.3.6. Кровать при эксплуатации устойчива к воздействию климатических факторов по ГОСТ Р 50444 для вида климатического исполнения УХЛ 4.2.

2.3.7. Кровать при транспортировании и хранении устойчива к воздействию климатических факторов по ГОСТ 15150 для группы 5 транспортирования и группы 5 хранения.

2.3.8. Средний срок службы кровати до списания не менее 6 лет. За критерий предельного состояния кровати принимается состояние, при котором восстановление работоспособности нецелесообразно по технико-экономическим и функциональным показателям.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1. Комплект поставки кровати соответствует указанному в таблице 3.

Таблица 3.

№	Наименование комплектующего	Количество, шт.	Размеры (±5 мм)
1	Подматрачная рама	1	2100x900
2	Ножка	2	930x300
3	Колесо	4	
4	Спинка	2	930x400
5	Отбойник	4	
6	Болт м8x70	8	
7	Шайба 8	8	
8	Гайка м8	8	
9	Винт м10x30	4	
10	Шайба 10	4	
11	Болт м10x45	4	
12	Шайба 10	4	
13	Инструкция по эксплуатации и сборке	1	A4

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1. Кровать представляет собой сборно-разборную конструкцию.

4.2. Ложة кровати изготовлено из стального П-образного профиля и металлической сетки толщиной 4 мм с размером ячейки 50x50 мм.

4.3. Спинки изготовлены из стального профиля круглого сечения.

5. ПОДГОТОВКА К СБОРКЕ

5.1. После транспортирования кровати в условиях отрицательных температур, перед распаковкой необходимо выдержать его в нормальных температурных условиях не менее 2 часов.

5.2. Распаковать кровать и проверить целостность покрытия.

5.3. Проверить комплектность.

5.4. Осуществить сборку согласно инструкции.

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

6.1. Техническое обслуживание включает в себя периодический осмотр целостности покрытий и проверку надежности резьбовых соединений. В случае ослабления резьбовых соединений необходимо затянуть их ключом.

6.2. Кровать, в случае необходимости, дезинфицируют растворами, разрешенными для дезинфекционной обработки поверхностей, согласно «Методическим указаниям по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения» (утв. Минздравом РФ 30.12.1998 N МУ-287-113).

7. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

7.1. Кровать в упаковке предприятия-изготовителя транспортируется крытыми транспортными средствами при температуре от -50°C до +50°C и относительной влажности 100% при температуре +25°C.

7.2. Хранение должно обеспечиваться при тех же условиях в сухих складских помещениях, исключающих воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред.

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

8.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие кровати требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных в технических условиях и указанных в настоящем паспорте.

8.2. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода кровати в эксплуатацию, гарантийный срок хранения 6 месяцев.

8.3. В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель безвозмездно ремонтирует или заменяет изделие или его составные части в случае неисправности при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Кровать ТВ-КБ-02.02 _____

Дата выпуска _____ М. П.

Соответствует ТУ 32.50.30-002-25549916-2017 и признана годной к эксплуатации.

Подпись лиц, ответственных за приемку _____

11. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Изделие _____ - _____

наименование и тип изделия

дата выпуска

номер ТУ


Приобретено _____

дата, подпись, штамп торгующей организации

11. УТИЛИЗАЦИЯ

11.1. Для предотвращения загрязнённости окружающей среды все отходы, образующиеся при утилизации изделий и их частей, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией, в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» для отходов класса А

Инструкция по сборке кровати ТВ-КБ-02.02

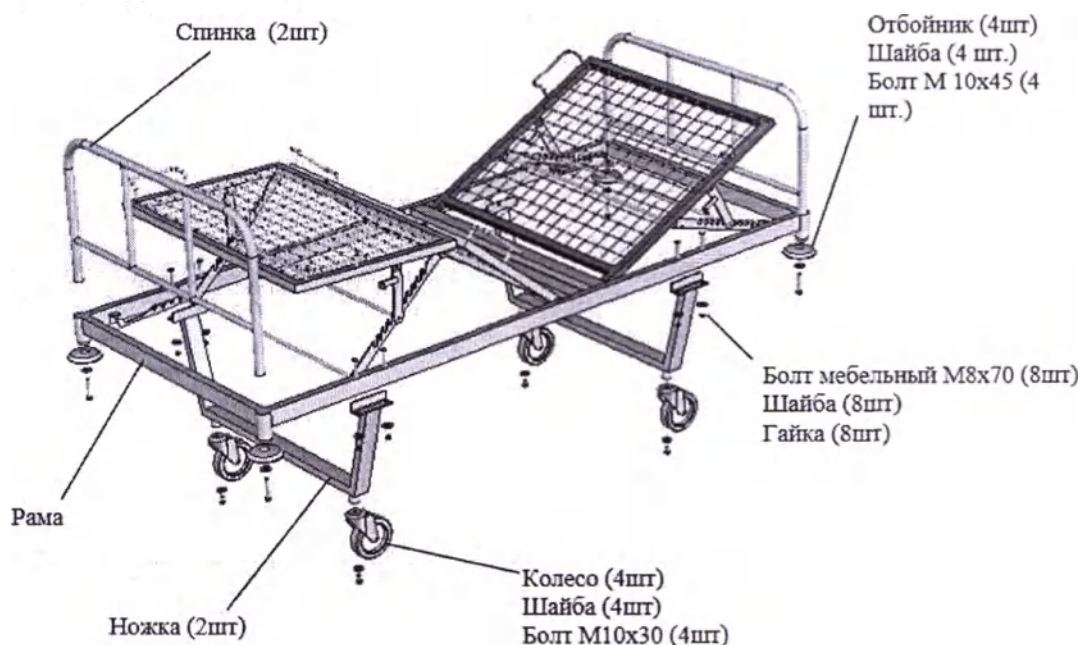

- 1) Прикрепить колеса к ножкам при помощи винтов м10х30 и шайб 10
- 2) Прикрепить ножки к раме при помощи болтов м8х70, гаек м8 и шайб 8
- 3) Вставить спинки в каркас
- 4) Прикрепить отбойники при помощи болтов м10х45 и шайб 10

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

6 (шесть) листа(ов)

Комаров Сергей Андреевич Ф.И.О.

ООО "Цирми" личная подпись



ООО «МебельПром»

Российская федерация, 607650, Нижегородская обл., г. Кстово, пл. Ленина,
дом 5а, офис 617, тел. 8(831)4524611, ОГРН 1135250001512, ИНН/КПП
5250058404/525001001 e-mail: Mebelprom.nn@yandex.ru



Инструкция по эксплуатации и сборке (Паспорт)

Набор мебели медицинской для кабинетов и
палат по ТУ 32.50.30-002-25549916-2017

КУШЕТКА СМОТРОВАЯ ТВ-КС-01



Нижегородская область, г. Кстово, 2017

Инструкция по эксплуатации и сборке (ПАСПОРТ) медицинского изделия

КУШЕТКА СМОТРОВАЯ ТВ-КС-01 производства ООО «МебельПром»

ТУ 32.50.30-002-25549916-2017

РУ _____

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

К сборке и эксплуатации кушетки допускаются лица, внимательно изучившие настоящее описание и конструкцию изделия.

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Назначение медицинского изделия - для оснащения медицинских лабораторий, лечебно-профилактических учреждений, а именно: для хранения реактивов, хранения медицинских инструментов, реагентов, для размещения лабораторных приборов и медицинских изделий, размещения пациентов в смотровых и массажных кабинетах, а также для организации работы медицинского персонала и лабораторного применения.

1.2. Кушетка смотровая ТВ-КС-01 (далее по тексту — кушетка) предназначена для оснащения лечебно-профилактических учреждений, а именно: размещения пациентов в смотровых и массажных кабинетах.

Побочное действие и противопоказания: Не выявлены.

1.3. Кушетка изготавливается для эксплуатации при температуре окружающей среды от +10°C до +35°C и относительной влажности 80% при температуре +25°C.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Основные параметры и размеры.

2.2.1. Основные параметры и размеры кушетки указаны в таблице 1.

Таблица 1.

Габаритные размеры (±5 мм)	Значение
Длина, мм	1950
Ширина, мм	650
Высота, мм	550
Вес, кг	не более 26

2.2.2. Функциональные размеры указаны в таблице 2.

Таблица 2.

Функциональные размеры (±5 мм)	Размеры (±5 мм)
Размеры ложа	Длина: 1950 мм, Ширина: 650 мм
Размер подголовника	Длина: 450 мм, Ширина: 650 мм
Угол наклона подголовника, в пределах	От 0 до 30°
Высота от пола до ложа	550 мм

2.3. Характеристики:

2.3.1. Кушетка выдерживает равномерно распределенную по ложу нагрузку массой не более 120 кг.

2.3.2. Кушетка состоит из двух секций — подголовника и ложа. Угол подъема подголовника относительно горизонтальной плоскости изменяется от 0 до 30 градусов при помощи подъемного механизма.

2.3.3. Подголовник и лежак изготовлены из ДСП, поролоновой прослойки и облицованы винилискожей, разрешенных к применению в изделиях медицинского

назначения.

2.3.4. Кушетка стоит на поверхности пола устойчиво, при этом зазор между полом и одной из ножек не более 3 мм.

2.3.5. Каркас кушетки изготовлен из стальных труб квадратного сечения и полос.

2.3.6. Кушетка при эксплуатации устойчива к воздействию климатических факторов по ГОСТ 15150 для вида климатического исполнения УХЛ 4.2.

2.3.7. Средний срок службы кушеток до списания не менее 8 лет. За критерий предельного состояния кушетки принимается состояние, при котором восстановление работоспособности нецелесообразно по технико-экономическим и функциональным показателям.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1. Комплект поставки кушетки соответствует указанному в таблице 3.

Таблица 3.

№	Наименование комплектующего	Количество, шт.	Размеры (±5 мм)
1	Ложе	1	1950x650
2	Стойка левая	1	650x550
3	Стойка правая	1	650x550
4	Стяжка	1	
5	Болт м10x45	6	
6	Шайба	6	
7	Заглушка	4	
8	Инструкция по эксплуатации и сборке	1	A4

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1. Кушетка состоит из ложа (лежака с подголовником) и каркаса (рамы, стоек и стяжки).

4.2. Угол наклона подголовника относительно горизонтальной плоскости плавно изменяется от 0 до 45 градусов.

5. ПОДГОТОВКА К СБОРКЕ

5.1. После транспортирования кушетки в условиях отрицательных температур, перед распаковкой необходимо выдержать ее в нормальных температурных условиях не менее 2 часов.

5.2. Распаковать кушетку и проверить целостность покрытия.

5.3. Проверить комплектность.

5.4. Осуществить сборку согласно инструкции.

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

6.1. Техническое обслуживание включает в себя периодический осмотр целостности покрытий и проверку надежности резьбовых соединений. В случае ослабления резьбовых соединений необходимо затянуть их ключом.

6.2. Кушетку, в случае необходимости, дезинфицируют растворами, разрешенными для дезинфекционной обработки поверхностей, согласно «Методическим указаниям по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения» (утв. Минздравом РФ 30.12.1998 N МУ-287-113).

7. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

7.1. Кушетка в упаковке предприятия-изготовителя транспортируется крытыми транспортными средствами при температуре от -50°C до +50°C и относительной влажности 100% при температуре +25°C.

7.2. Хранение должно обеспечиваться при тех же условиях в сухих складских помещениях, исключающих воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред.

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

8.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие кушетки требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных в технических условиях и указанных в настоящем паспорте.

8.2. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода кушетки в эксплуатацию, гарантийный срок хранения 6 месяцев.

8.3. В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель безвозмездно ремонтирует или заменяет изделие или его составные части в случае неисправности при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Кушетка ТВ-КС-01 _____

Дата выпуска _____ М. П.

Соответствует ТУ 32.50.30-002-25549916-2017 и признана годной к эксплуатации.

Подпись лиц, ответственных за приемку _____

11. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Изделие _____ - _____

наименование и тип изделия

дата выпуска

номер ТУ


Приобретено _____

11. УТИЛИЗАЦИЯ

11.1. Для предотвращения загрязнённости окружающей среды все отходы, образующиеся при утилизации изделий и их частей, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией, в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» для отходов класса А.

Инструкция по сборке кушетки ТВ-КС-01

- 1). Соединить болтами раму и стойки, вставив упор в ушко на левой стойке. При этом ушко должно быть повернуто в сторону стойки.
- 2). Прикрепить болтами стяжку к стойкам

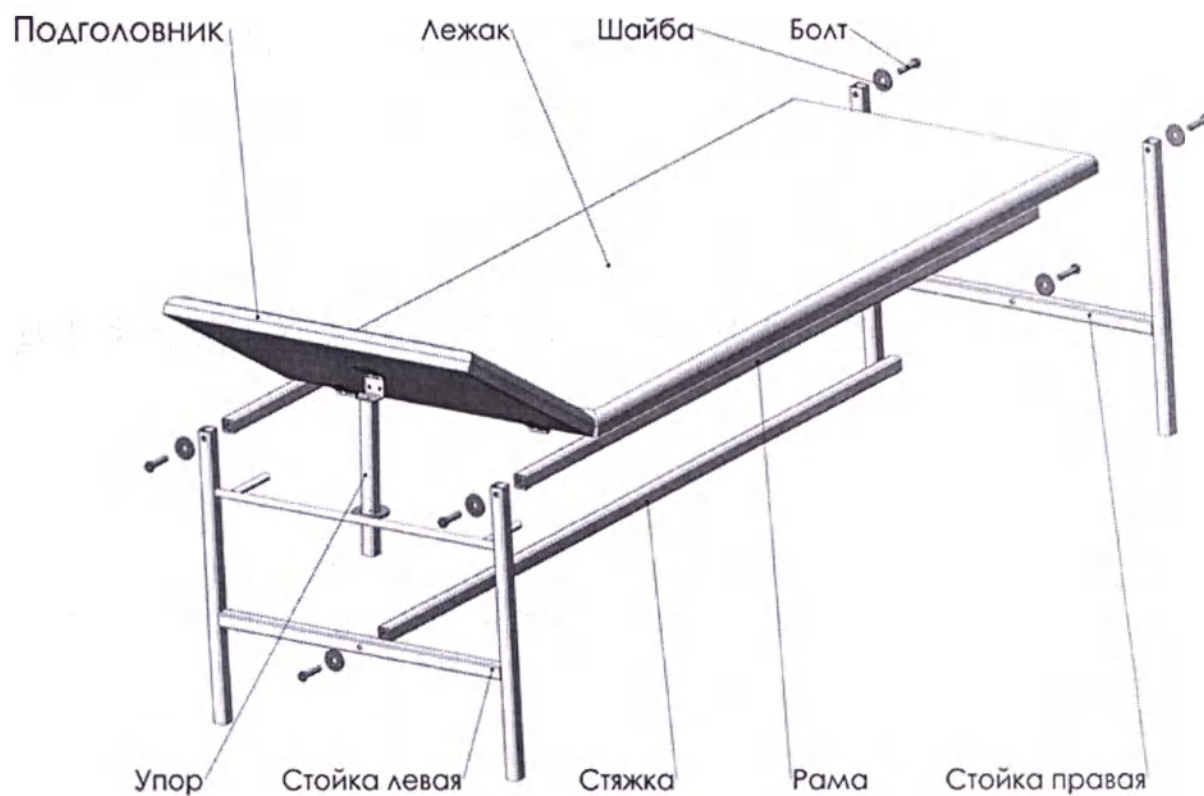

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

6 (ЦИРМИ) листа(ов)


Комаров Сергей Андреевич Ф.И.О.

личная подпись



ООО «МебельПром»

Российская федерация, 607650, Нижегородская обл., г. Кстово, пл. Ленина,
дом 5а, офис 617, тел. 8(831)4524611, ОГРН 1135250001512, ИНН/КПП
5250058404/525001001 e-mail: Mebelprom.nn@yandex.ru

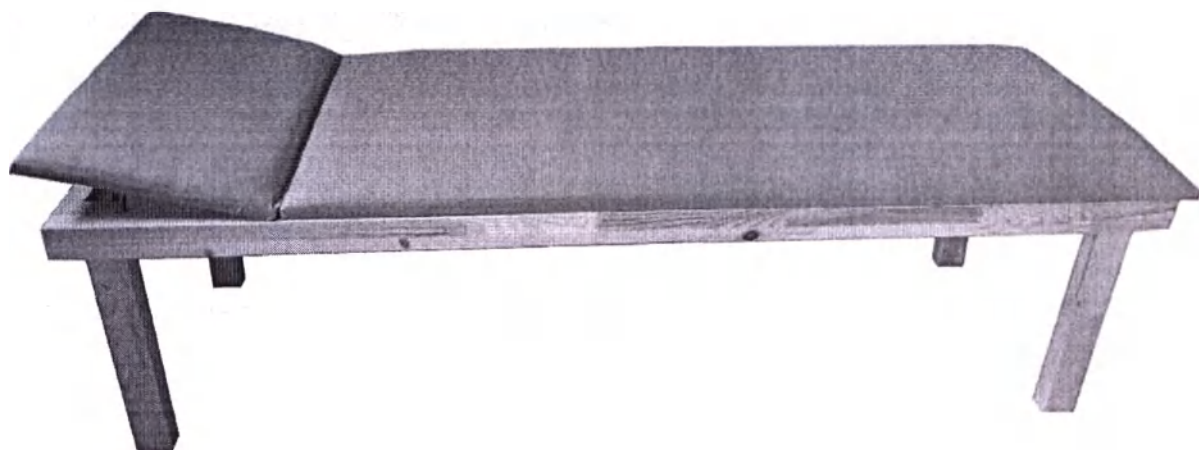

Инструкция по эксплуатации и сборке (Паспорт)

Набор мебели медицинской для кабинетов и
палат по ТУ 32.50.30–002–25549916–2017

КУШЕТКА ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ТВ-КФ-01



Нижегородская область, г. Кстово, 2017

Колесов С.А.
Д.А. Зин.

Инструкция по эксплуатации и сборке (ПАСПОРТ) медицинского изделия
КУШЕТКА ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ТВ-КФ-01 производства ООО «МебельПром»
ТУ 32.50.30–002–25549916–2017

РУ _____

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

К сборке и эксплуатации кушетки допускаются лица, внимательно изучившие настоящее описание и конструкцию изделия.

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1. Назначение медицинского изделия - для оснащения медицинских лабораторий, лечебно-профилактических учреждений, а именно: для хранения реактивов, хранения медицинских инструментов, реагентов, для размещения лабораторных приборов и медицинских изделий, размещения пациентов в смотровых и массажных кабинетах, а также для организации работы медицинского персонала и лабораторного применения.

1.2. Кушетка физиотерапевтическая ТВ-КФ-01 (далее по тексту — кушетка) предназначена для оснащения лечебно-профилактических учреждений, а именно: размещения пациентов в смотровых и массажных кабинетах.

Побочное действие и противопоказания: Не выявлены.

1.3. Кушетка изготавливается для эксплуатации при температуре окружающей среды от +10°C до +35°C и относительной влажности 80% при температуре +25°C.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Основные параметры и размеры.

2.2.1. Основные параметры и размеры кушетки указаны в таблице 1.

Таблица 1.

Габаритные размеры (±5 мм)	Значение
Длина, мм	1950
Ширина, мм	650
Высота, мм	520
Вес, кг	не более 36

2.2.2. Функциональные размеры указаны в таблице 2.

Таблица 2.

Функциональные размеры (±5 мм)	Размеры (±5 мм)
Размеры ложа	Длина: 1950 мм, Ширина: 650 мм
Размер подголовника	Длина: 450 мм, Ширина: 650 мм
Угол наклона подголовника, в пределах	От 0 до 30°
Высота от пола до ложа	520 мм

2.3. Характеристики:

2.3.1. Кушетка выдерживает равномерно распределенную по ложу нагрузку массой не более 120 кг.

2.3.2. Кушетка состоит из двух секций — подголовника и ложа. Угол подъема подголовника относительно горизонтальной плоскости изменяется от 0 до 45 градусов при помощи подъемного механизма.

2.3.3. Подголовник и лежак изготовлены из ДСП, поролоновой прослойки и облицованы винилискожей, разрешенных к применению в изделиях медицинского

назначения.

2.3.4. Кушетка стоит на поверхности пола устойчиво, при этом зазор между полом и одной из ножек не более 3 мм.

2.3.5. Каркас кушетки изготовлен из массива дерева.

2.3.6. Кушетка при эксплуатации устойчива к воздействию климатических факторов по ГОСТ 15150 для вида климатического исполнения УХЛ 4.2.

2.3.7. Средний срок службы кушеток до списания не менее 8 лет. За критерий предельного состояния кушетки принимается состояние, при котором восстановление работоспособности нецелесообразно по технико-экономическим и функциональным показателям.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1. Комплект поставки кушетки соответствует указанному в таблице 3.

Таблица 3.

№	Наименование комплектующего	Количество, шт.	Размеры (±5 мм)
1	Ложе	1	1950х650
2	Стойка левая	1	650х520
3	Стойка правая	1	650х520
4	Стяжка	1	
5	Болт м10х45	6	
6	Шайба	6	
7	Заглушка	4	
8	Инструкция по эксплуатации и сборке	1	A4

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1. Кушетка состоит из ложа (лежака с подголовником) и каркаса (рамы, стоек и стяжки).

4.2. Угол наклона подголовника относительно горизонтальной плоскости плавно изменяется от 0 до 30 градусов.

5. ПОДГОТОВКА К СБОРКЕ

5.1. После транспортирования кушетки в условиях отрицательных температур, перед распаковкой необходимо выдержать ее в нормальных температурных условиях не менее 2 часов.

5.2. Распаковать кушетку и проверить целостность покрытия.

5.3. Проверить комплектность.

5.4. Осуществить сборку согласно инструкции.

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

6.1. Техническое обслуживание включает в себя периодический осмотр целостности покрытий и проверку надежности резьбовых соединений. В случае ослабления резьбовых соединений необходимо затянуть их ключом.

6.2. Кушетку, в случае необходимости, дезинфицируют растворами, разрешенными для дезинфекционной обработки поверхностей, согласно «Методическим указаниям по дезинфекции,

предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения" (утв. Минздравом РФ 30.12.1998 N МУ-287-113).

7. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

7.1. Кушетка в упаковке предприятия-изготовителя транспортируется крытыми транспортными средствами при температуре от -50°C до +50°C и относительной влажности 100% при температуре +25°C.

7.2. Хранение должно обеспечиваться при тех же условиях в сухих складских помещениях, исключающих воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред.

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

8.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие кушетки требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных в технических условиях и указанных в настоящем паспорте.

8.2. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода кушетки в эксплуатацию, гарантийный срок хранения 6 месяцев.

8.3. В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель безвозмездно ремонтирует или заменяет изделие или его составные части в случае неисправности при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Кушетка ТВ-КФ-01 _____

Дата выпуска _____ М. П.

Соответствует ТУ 32.50.30-002-25549916-2017 и признана годной к эксплуатации.

Подпись лиц, ответственных за приемку _____

11. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Изделие _____ - _____

наименование и тип изделия

дата выпуска

номер ТУ

Приобретено _____


дата, подпись, штамп торгующей организации

11. УТИЛИЗАЦИЯ

11.1. Для предотвращения загрязнённости окружающей среды все отходы, образующиеся при утилизации изделий и их частей, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией, в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» для отходов класса А.

Инструкция по сборке кушетки ТВ-КФ-01

- 1). Соединить болтами раму и стойки, вставив упор в ушко на левой стойке. При этом ушко должно быть повернуто в сторону стойки.
- 2). Прикрепить болтами стяжку к стойкам

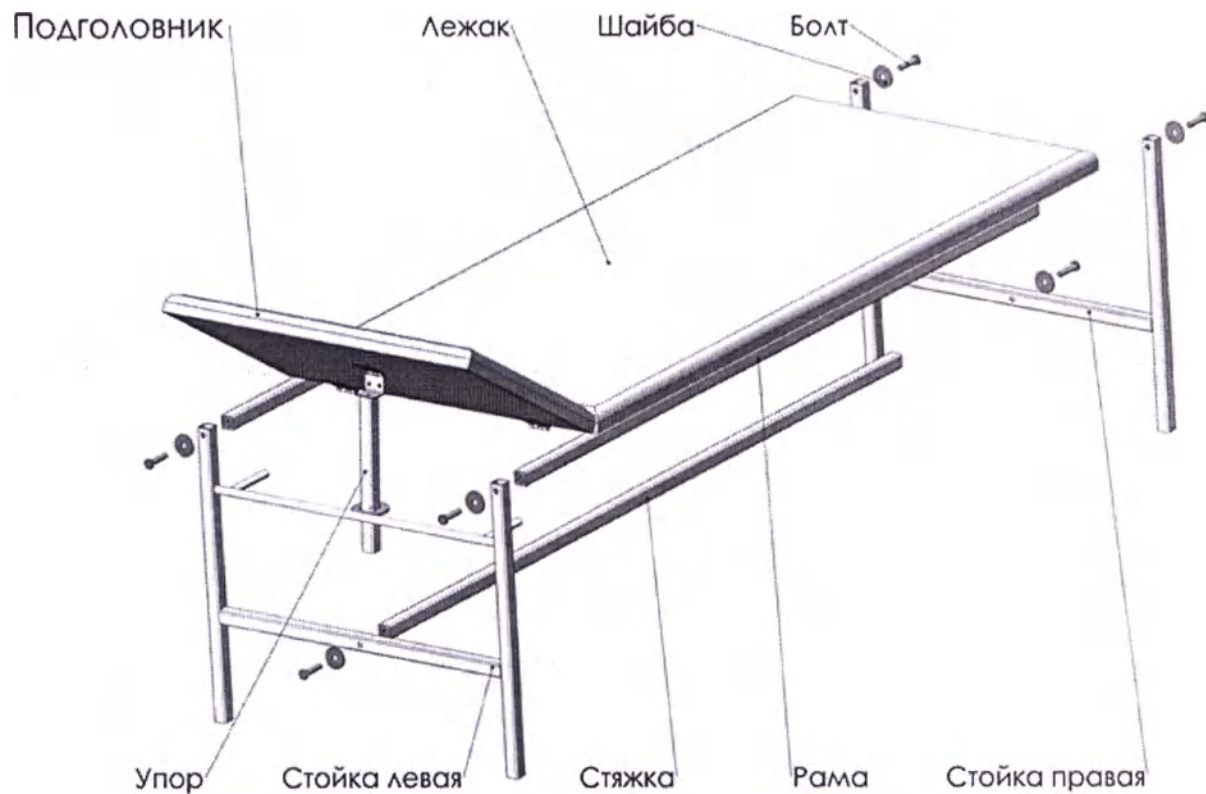

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
6 (целить) листа(ов)

Комаров Сергей Андреевич Ф.И.О.

личная подпись



ООО «МебельПром»

Российская федерация, 607650, Нижегородская обл., г. Кстово, пл. Ленина,
дом 5а, офис 617, тел. 8(831)4524611, ОГРН 1135250001512, ИНН/КПП
5250058404/525001001 e-mail: Mebelprom.nn@yandex.ru



Инструкция по эксплуатации и сборке (Паспорт)

Набор мебели медицинской для кабинетов и
палат по ТУ 32.50.30-002-25549916-2017

СТОЛЫ ПРОЦЕДУРНЫЕ ТВ-СПР-01(н),
ТВ-СПР-02

КОПИЯ
ВЕРНА



Нижегородская область, г. Кстово, 2017

Инструкция по эксплуатации и сборке (ПАСПОРТ) медицинского изделия
СТОЛЫ ПРОЦЕДУРНЫЕ ТВ-СПР-01(н), ТВ-СПР-02 производства ООО «МебельПром»
ТУ 32.50.30–002–25549916–2017

РУ _____

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

К сборке и эксплуатации стола допускаются лица, внимательно изучившие настоящее описание и конструкцию изделия.

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Назначение медицинского изделия - для оснащения медицинских лабораторий, лечебно-профилактических учреждений, а именно: для хранения реактивов, хранения медицинских инструментов, реагентов, для размещения лабораторных приборов и медицинских изделий, размещения пациентов в смотровых и массажных кабинетах, а также для организации работы медицинского персонала и лабораторного применения.

1.2 Стол процедурный ТВ-СПР-01(н), ТВ-СПР-02 (далее по тексту – стол, столы) предназначен для оснащения лечебно-профилактических учреждений, а именно: хранения медицинских инструментов, реагентов, для размещения лабораторных приборов и медицинских изделий, а также для организации работы медицинского персонала и лабораторного применения.

Побочное действие и противопоказания: Не выявлены.

1.3 Столы изготавливаются для эксплуатации при температуре окружающей среды от +10°C до +35°C и относительной влажности 80% при температуре +25°C.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Основные параметры и размеры.

2.2.1. Основные параметры и размеры стола указаны в таблицах 1-2.

Таблица 1. ТВ-СПР-01(н)

Габаритные размеры (±5 мм)	Значение
Длина, мм	640
Ширина, мм	420
Высота, мм	890
Вес, кг	не более 14

Таблица 2. ТВ-СПР-02

Габаритные размеры (±5 мм)	Значение
Длина, мм	640
Ширина, мм	420
Высота, мм	890
Вес, кг	не более 15

2.2.2. Функциональные размеры указаны в таблице 4.

Таблица 4.

Функциональные размеры (±5 мм)	Размеры (±5 мм)
--------------------------------	-----------------

Размеры рабочей плоскости	Длина: 640 мм, Ширина: 420 мм
Расстояние от пола до верхней кромки рабочей плоскости	890 мм
Расстояние от пола до нижней кромки рабочей плоскости	870 мм
Расстояние между боковыми панелями	600 мм

2.3. Характеристики:

2.3.1 Каркас столика имеет защитно-декоративное покрытие эпоксидной порошковой краской, нетоксичной, пожаробезопасной, устойчивой к ударам, сколам, средствам дезинфекционной обработки способом протирания, прошедшей обработку в термотонеле.

2.3.2 Покрытие металлических деталей соответствует требованиям IV класса ГОСТ 9.303 и ГОСТ 9.032 по внешнему виду, а по условиям эксплуатации группе УХЛ 4.2 по ГОСТ 9.014.

2.3.3 Поверхность столика устойчива к дезинфицирующим средствам, разрешенным для дезинфекционной обработки поверхностей в соответствии с действующими НТД на эти средства и ГОСТ 42-21-2, МУ 287-113Б, утвержденными МЗ РФ 30.12.998 года.

2.3.4 Столик при эксплуатации устойчив к воздействию климатических факторов по ГОСТ 15150 для вида исполнения УХЛ 4.2.

2.3.5 Столик, упакованный в транспортную тару, сохраняет работоспособность после механических воздействий по ГОСТ Р 50444.

2.3.6 Средний срок службы столика до списания не менее 6 лет.

2.3.7 За критерий предельного состояния столиков принимается состояние, при котором восстановление работоспособности нецелесообразно по технико-экономическим и функциональным показателям.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1. Комплект поставки стола соответствует указанному в таблице 5.

Таблица 5.

№	Наименование комплектующего	Количество, шт.	Размеры (±5 мм)
1	Стойка	2	
2	Дуга	1	
3	Рамка	1	
4	Винт м6х35	8	
5	Гайка м6	8	
6	Шайба 6	8	
7	Полка	2	
	Колесо	4	
8	Инструкция по эксплуатации и сборке	1	A4

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1 Столик выдерживает равномерно распределенную нагрузку массой не менее 40 кг.

4.2 Столик имеет 4 колеса, диаметром не менее 50 мм, вращающиеся вокруг вертикальной оси.

4.3 Усилие, необходимое для перемещения столика с номинальной нагрузкой не более 100 Н (10 кг), при этом колеса столиков должны быть сориентированы в направлении движения.

4.4 В зависимости от модели столики состоят из:

Каркаса(дуги, стоек, рамок);

- двух полок;

- трех полок.

4.5 Каркас столика изготовлен из стальных труб круглого сечения.

4.6. Полки могут быть изготовлены из стекла или нержавеющей стали 12Х18Н10Т,.

4.6 Полки столика могут иметь ограждения, изготовленные из трубы круглого сечения и приваренные к каркасу.

5. ПОДГОТОВКА К СБОРКЕ

5.1. После транспортирования стола в условиях отрицательных температур, перед распаковкой необходимо выдержать его в нормальных температурных условиях не менее 2 часов.

5.2. Распаковать стол и проверить целостность покрытия.

5.3. Проверить комплектность.

5.4. Осуществить сборку согласно инструкции.

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

6.1. Техническое обслуживание включает в себя периодический осмотр целостности покрытий и проверку надежности резьбовых соединений. В случае ослабления резьбовых соединений необходимо затянуть их ключом.

6.2. Стол, в случае необходимости, дезинфицируют растворами, разрешенными для дезинфекционной обработки поверхностей, согласно «Методическим указаниям по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения» (утв. Минздравом РФ 30.12.1998 N МУ-287-113).

7. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

7.1. Столы в упаковке транспортируются простыми транспортными средствами при температуре от -50°C до +50°C и относительной влажности 100% при температуре +25°C.

7.2. Хранение должно обеспечиваться при тех же условиях в сухих складских помещениях, исключая воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред; воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию металла.

7.3. После транспортирования изделия в условиях отрицательных температур, перед распаковкой необходимо выдержать их в нормальных условиях не менее 2 часов.

7.4 Распаковать столик и проверить целостность покрытия и целостность полок (для моделей со стеклянными полками).

7.5 Удалить защитную пленку с полок изготовленных из нержавеющей стали.

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

8.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие стола требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных в технических условиях и указанных в настоящем паспорте.

8.2. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода стола в эксплуатацию, гарантийный срок хранения 6 месяцев.

8.3. В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель безвозмездно ремонтирует или заменяет изделие или его составные части в случае неисправности при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Стол процедурный _____

Дата выпуска _____ М. П.

Соответствует ТУ 32.50.30-002-25549916-2017 и признан годным к эксплуатации.

Подпись лиц, ответственных за приемку _____

10. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

на ремонт (замену) в течение гарантийного срока
Изделие _____
наименование и тип изделия

_____ дата выпуска

_____ номер ТУ

Приобретено _____
дата, подпись, штамп торгующей организации

11. УТИЛИЗАЦИЯ

11.1. Для предотвращения загрязнённости окружающей среды все отходы, образующиеся при утилизации изделий и их частей, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией, в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» для отходов класса А.

Инструкция по сборке стол процедурный ТВ-СПР-01(н), ТВ-СПР-02

- 1) Прикрепить рамки к дуге и стойкам винтами и гайками. Сборку производить с верхней рамки.
- 2) Прикрепить колеса к дуге и стойкам.
- 3) Для более надежной фиксации резьбы рекомендуем винты посадить на краску.
- 4) Установить поддоны.

Рисунок 1


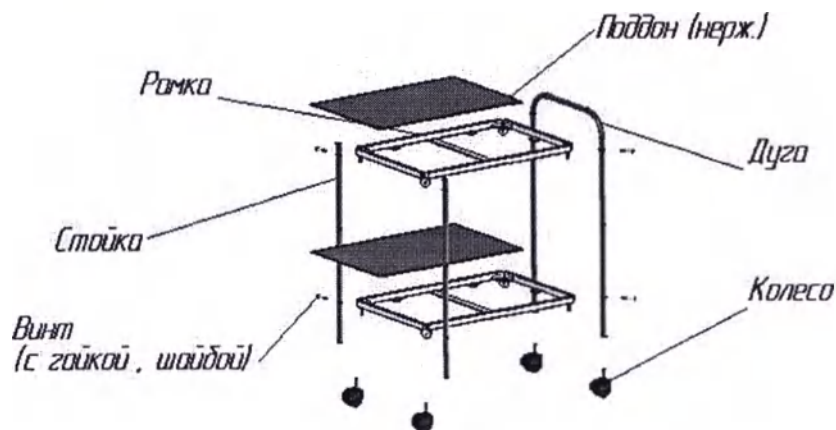


Рисунок 2

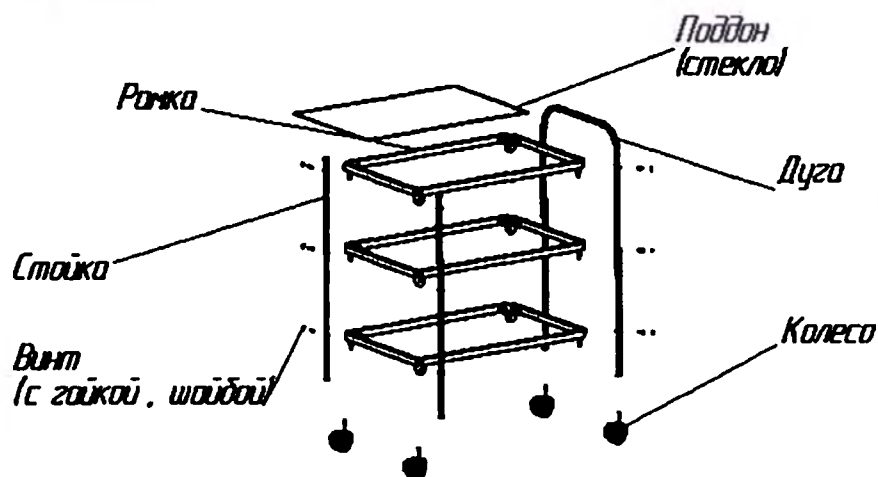

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

6 (ЦДЕАТЪ) листа(ов)

Комаров Сергей Андреевич Ф.И.О.

личная подпись



ООО «МебельПром»

Российская федерация, 607650, Нижегородская обл., г. Кстово, пл. Ленина,
дом 5а, офис 617, тел. 8(831)4524611, ОГРН 1135250001512, ИНН/КПП
5250058404/525001001 e-mail: Mebelprom.nn@yandex.ru



Инструкция по эксплуатации и сборке (Паспорт)

Набор мебели медицинской для кабинетов и
палат по ТУ 32.50.30-002-25549916-2017

СТОЛ ПРОЦЕДУРНЫЙ С БОРТАМИ ТВ- СПР-03

Нижегородская область, г. Кстово, 2017

КОПИЯ
ВЕРНА



Инструкция по эксплуатации и сборке (ПАСПОРТ) медицинского изделия
СТОЛ ПРОЦЕДУРНЫЙ С БОРТАМИ ТВ-СПР-03 производства ООО «МебельПром»
ТУ 32.50.30-002-25549916-2017

РУ _____

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

К сборке и эксплуатации стола допускаются лица, внимательно изучившие настоящее описание и конструкцию изделия.

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Назначение медицинского изделия - для оснащения медицинских лабораторий, лечебно-профилактических учреждений, а именно: для хранения реактивов, хранения медицинских инструментов, реагентов, для размещения лабораторных приборов и медицинских изделий, размещения пациентов в смотровых и массажных кабинетах, а также для организации работы медицинского персонала и лабораторного применения.

1.2 Стол процедурный с бортами ТВ-СПР-03 (далее по тексту – стол, столы) предназначен для оснащения лечебно-профилактических учреждений, а именно: хранения медицинских инструментов, реагентов, для размещения лабораторных приборов и медицинских изделий, а также для организации работы медицинского персонала и лабораторного применения.

Побочное действие и противопоказания: Не выявлены.

1.3 Столы изготавливаются для эксплуатации при температуре окружающей среды от +10°C до +35°C и относительной влажности 80% при температуре +25°C.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Основные параметры и размеры.

2.2.1. Основные параметры и размеры стола указаны в таблице 1.

Таблица 1. ТВ-СПР-03

Габаритные размеры (±5 мм)	Значение
Длина, мм	800
Ширина, мм	500
Высота, мм	900
Вес, кг	не более 15

2.2.2. Функциональные размеры указаны в таблице 2.

Таблица 2.

Функциональные размеры (±5 мм)	Размеры (±5 мм)
Размеры рабочей плоскости	Длина: 800 мм, Ширина: 500 мм
Расстояние от пола до верхней кромки рабочей плоскости	900 мм
Расстояние от пола до нижней кромкой рабочей плоскости	850 мм
Расстояние между боковыми панелями	740 мм

2.3. Характеристики:

- 2.3.1 Каркас стола имеет защитно-декоративное покрытие эпоксидной порошковой краской, нетоксичной, пожаробезопасной, устойчивой к ударам, сколам, средствам дезинфекционной обработки способом протирания, прошедшей обработку в термотонеле.
- 2.3.2 Покрытие металлических деталей соответствует требованиям IV класса ГОСТ 9.303 и ГОСТ 9.032 по внешнему виду, а по условиям эксплуатации группе УХЛ 4.2 по ГОСТ 9.014.
- 2.3.3 Поверхность стола устойчива к дезинфицирующим средствам, разрешенным для дезинфекционной обработки поверхностей в соответствии с действующими НТД на эти средства и ГОСТ 42-21-2, МУ 287-113Б, утвержденными МЗ РФ 30.12.998 года.
- 2.3.4 Стол при эксплуатации устойчив к воздействию климатических факторов по ГОСТ 15150 для вида исполнения УХЛ 4.2.
- 2.3.5 Стол, упакованный в транспортную тару, сохраняет работоспособность после механических воздействий по ГОСТ Р 50444.
- 2.3.6 Средний срок службы столика до списания не менее 6 лет.
- 2.3.7 За критерий предельного состояния столиков принимается состояние, при котором восстановление работоспособности нецелесообразно по технико-экономическим и функциональным показателям.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- 3.1. Комплект поставки стола соответствует указанному в таблице 3.

Таблица 3.

№	Наименование комплектующего	Количество, шт.	Размеры (±5 мм)
1	Стойка	2	
2	Дуга	1	900x500
3	Рамка	1	
4	Винт м6x35	8	
5	Гайка м6	8	
6	Шайба 6	8	
7	Полка	2	800x500
	Колесо	4	
8	Инструкция по эксплуатации и сборке	1	A4

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

- 4.1 Стол выдерживает равномерно распределенную нагрузку массой не менее 40 кг.
- 4.2 Стол имеет 4 колеса, диаметром не менее 50 мм, вращающиеся вокруг вертикальной оси.
- 4.3 Усилие, необходимое для перемещения столика с номинальной нагрузкой не более 100 Н (10 кг), при этом колеса столиков должны быть сориентированы в направлении движения.
- 4.4 В зависимости от модели столики состоят из:
- Каркаса(дуги, стоек, рамок);
- двух полок;
 - трех полок.
- 4.5 Каркас столика изготовлен из стальных труб круглого сечения.
- 4.6. Полки могут быть изготовлены из стекла или нержавеющей стали 12Х18Н10Т.,
- 4.6 Полки столика могут иметь ограждения, изготовленные из трубы круглого сечения и приваренные к каркасу.

5. ПОДГОТОВКА К СБОРКЕ

- 5.1. После транспортирования стола в условиях отрицательных температур, перед распаковкой необходимо выдержать его в нормальных температурных условиях не менее 2 часов.

5.2. Распаковать стол и проверить целостность покрытия.

5.3. Проверить комплектность.

5.4. Осуществить сборку согласно инструкции.

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

6.1. Техническое обслуживание включает в себя периодический осмотр целостности покрытий и проверку надежности резьбовых соединений. В случае ослабления резьбовых соединений необходимо затянуть их ключом.

6.2. Стол, в случае необходимости, дезинфицируют растворами, разрешенными для дезинфекционной обработки поверхностей, согласно «Методическим указаниям по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения» (утв. Минздравом РФ 30.12.1998 N МУ-287-113).

7. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

7.1. Стол в упаковке транспортируются простыми транспортными средствами при температуре от -50°C до +50°C и относительной влажности 100% при температуре +25°C.

7.2. Хранение должно обеспечиваться при тех же условиях в сухих складских помещениях, исключающих воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред; воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию металла.

7.3. После транспортирования изделия в условиях отрицательных температур, перед распаковкой необходимо выдержать их в нормальных условиях не менее 2 часов.

7.4. Распаковать столик и проверить целостность покрытия и целостность полок (для моделей со стеклянными полками).

7.5. Удалить защитную пленку с полок изготовленных из нержавеющей стали.

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

8.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие стола требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных в технических условиях и указанных в настоящем паспорте.

8.2. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода стола в эксплуатацию, гарантийный срок хранения 6 месяцев.

8.3. В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель безвозмездно ремонтирует или заменяет изделие или его составные части в случае неисправности при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Стол процедурный с бортами ТВ-СПР-03 _____

Дата выпуска _____ М. П.

Соответствует ТУ 32.50.30-002-25549916-2017 и признан годным к эксплуатации.

Подпись лиц, ответственных за приемку _____

10. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Изделие _____
наименование и тип изделия

дата выпуска

номер ТУ

Приобретено _____
дата, подпись, штамп торгующей организации

11. УТИЛИЗАЦИЯ

11.1. Для предотвращения загрязнённости окружающей среды все отходы, образующиеся при утилизации изделий и их частей, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией, в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» для отходов класса А.

Инструкция по сборке СТОЛ ПРОЦЕДУРНЫЙ С БОРТАМИ ТВ-СПР-03

- 1) Прикрепить рамки к дуге и стойкам винтами и гайками. Сборку производить с верхней рамки.
- 2) Прикрепить колеса к дуге и стойкам.
- 3) Для более надежной фиксации резьбы рекомендуем винты посадить на краску.
- 4) Установить поддоны.

Рисунок 1


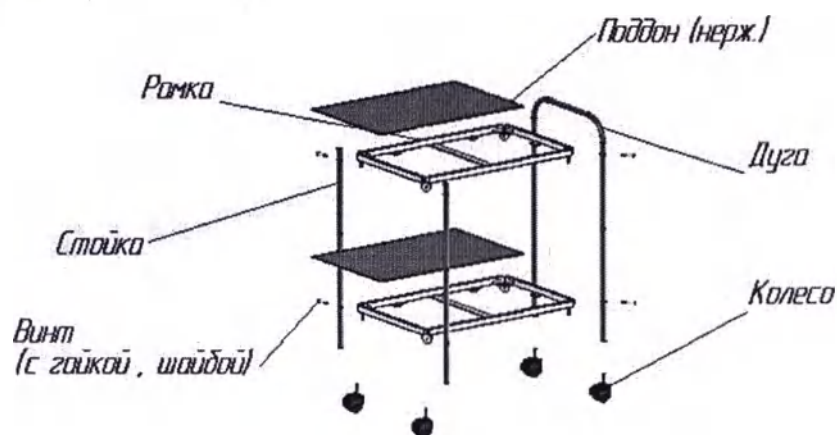


Рисунок 2

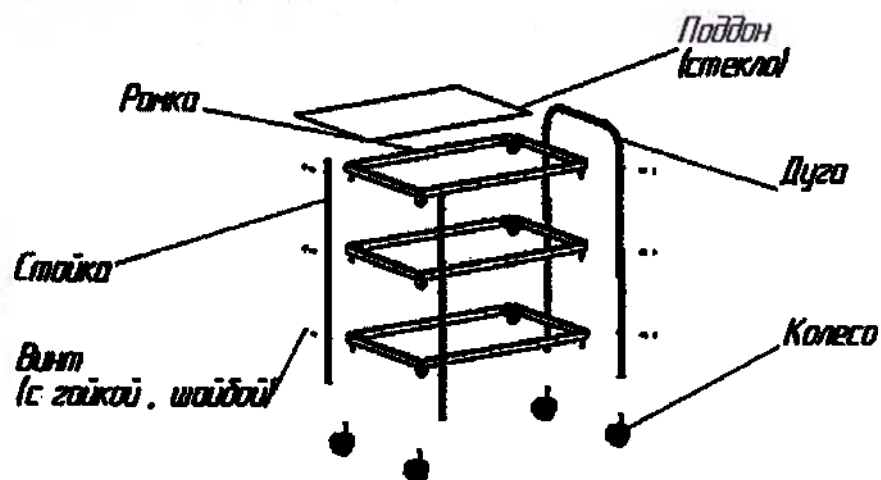

Всего прошито, пронумеровано

и скреплено печатью

Δ (цедьта) листа(ов)

Комаров Сергей Андреевич Ф.И.О.

личная подпись



ООО «МебельПром»

Российская федерация, 607650, Нижегородская обл., г. Кстово, пл. Ленина,
дом 5а, офис 617, тел. 8(831)4524611, ОГРН 1135250001512, ИНН/КПП
5250058404/525001001 e-mail: Mebelprom.nn@yandex.ru



Инструкция по эксплуатации и сборке (Паспорт)

Набор мебели медицинской для кабинетов и
палат по ТУ 32.50.30-002-25549916-2017

ПОДСТАВКА ДЛЯ БИКСОВ ТВ-ПДБ



Нижегородская область, г. Кстово, 2017

Инструкция по эксплуатации и сборке (ПАСПОРТ) медицинского изделия
ПОДСТАВКА ДЛЯ БИКСОВ ТВ-ПДБ производства ООО «МебельПром»

ТУ 32.50.30-002-25549916-2017

РУ _____

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

К сборке и эксплуатации подставки допускаются лица, внимательно изучившие настоящее описание и конструкцию изделия.

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Назначение медицинского изделия - для оснащения медицинских лабораторий, лечебно-профилактических учреждений, а именно: для хранения реактивов, хранения медицинских инструментов, реагентов, для размещения лабораторных приборов и медицинских изделий, размещения пациентов в смотровых и массажных кабинетах, а также для организации работы медицинского персонала и лабораторного применения.

1.2 Подставка для биксов ТВ-ПДБ (далее по тексту - подставка) предназначена для установки стерилизационных коробок в операционных и перевязочных кабинетах.

Побочное действие и противопоказания: не выявлены.

1.3 Подставки изготавливаются для эксплуатации при температуре окружающей среды от +10°C до +35°C и относительной влажности 80% при температуре +25°C.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Основные параметры и размеры.

2.2.1. Основные параметры и размеры подставки указаны в таблице 1.

Таблица 1. ТВ-ПДБ

Габаритные размеры (± 5 мм)	Значение
Длина, мм	450
Ширина, мм	450
Высота, мм	1115
Вес, кг	не более 9

2.2.2. Функциональные размеры указаны в таблице 2.

Таблица 2.

Функциональные размеры (± 5 мм)	Размеры (± 5 мм)
Диаметр основания	450 мм
Высота стойки	1115 мм

2.3. Характеристики:

2.3.1 Металлические детали имеют защитно-декоративное краской порошковой эпоксидно-полиэфирной по ТУ 2329-002-45318751-2008, нетоксичной пожаробезопасной, устойчивой к ударам, сколам, средствам дезинфекционной обработки способом протирания.

2.3.2 Поверхность подставки устойчива к обработке дезинфицирующими средствами, разрешенными для дезинфекционной обработки поверхностей в соответствии с действующими НТД на эти средства и ОСТ 42-21-2, МУ 287-113.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1. Комплект поставки для биксов соответствует указанному в таблице 3.

Таблица 3.

№	Наименование комплектующего	Количество, шт.	Размеры (±5 мм)
1	Направляющая	1	550x20
2	Тяга	1	1075x20
3	Столик	1	420x370
4	Регулятор	2	
5	Рукоятка	2	
6	Стойка	1	550x25
7	Подставка	1	450x450
8	Регулируемые опоры	5	
9	Крючок	1	240x10
10	Планка	1	200x25
11	Гайка м6	2	
12	Болт м6	2	
13	Болт м10	1	
14	Шайба 6	3	
15	Шайба 10	1	
16	Инструкция по эксплуатации и сборке	1	A4

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1 Подставка изготовлена из проката углеродистой стали.

4.2 Подставка имеет устройство для открывания крышки, установленного на них бикса. 4.3 Усилие, необходимое для открывания крышки бикса не превышает 50 Н (5 кгс).

4.4 Подставка имеет регулируемые по высоте опоры, обеспечивающие ее устойчивость на твердой горизонтальной поверхности пола. Диапазон регулирования — не менее 15 мм.

4.5 Подставка представляет собой сборно-разборную конструкцию.

5. ПОДГОТОВКА К СБОРКЕ

5.1. После транспортирования подставки в условиях отрицательных температур, перед распаковкой необходимо выдержать его в нормальных температурных условиях не менее 2 часов.

5.2. Распаковать подставку и проверить целостность покрытия.

5.3. Проверить комплектность.

5.4. Осуществить сборку согласно инструкции.

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

6.1. Техническое обслуживание включает в себя периодический осмотр целостности покрытий и проверку надежности резьбовых соединений. В случае ослабления резьбовых соединений необходимо затянуть их ключом.

6.2. Подставка, в случае необходимости, дезинфицируют растворами, разрешенными для дезинфекционной обработки поверхностей, согласно «Методическим указаниям по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения» (утв. Минздравом РФ 30.12.1998 N МУ-287-113).

7. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

- 7.1. Подставка в упаковке транспортируются простыми транспортными средствами при температуре от -50°C до +50°C и относительной влажности 100% при температуре +25°C.
- 7.2. Хранение должно обеспечиваться при тех же условиях в сухих складских помещениях, исключающих воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред; воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию металла.
- 7.3. После транспортирования изделия в условиях отрицательных температур, перед распаковкой необходимо выдержать их в нормальных условиях не менее 2 часов.
- 7.4. Распаковать подставку и проверить целостность покрытия и целостность полок (для моделей со стеклянными полками).
- 7.5. Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки наружных поверхностей (1-3% раствор хлорамина).

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- 8.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие подставки требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных в технических условиях и указанных в настоящем паспорте.
- 8.2. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода стола в эксплуатацию, гарантийный срок хранения 6 месяцев.
- 8.3. В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель безвозмездно ремонтирует или заменяет изделие или его составные части в случае неисправности при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

СТОЙКА ДЛЯ КАПЕЛЬНИЦЫ ТВ-ПДБ _____

Дата выпуска _____ М. П.

Соответствует ТУ 32.50.30-002-25549916-2017 и признан годным к эксплуатации.

Подпись лиц, ответственных за приемку _____

10. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

на ремонт (замену) в течение гарантийного срока
Изделие _____
наименование и тип изделия

_____ дата выпуска

_____ номер ТУ

Приобретено _____
дата, подпись, штамп торгующей организации

11. УТИЛИЗАЦИЯ


- 11.1. Для предотвращения загрязнённости окружающей среды все отходы, образующиеся при утилизации изделий и их частей, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией, в

установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» для отходов класса А.

Инструкция по сборке подставка для биксов ТВ-ПДБ

1. Установить регулируемые опоры (поз.7) в подставку (поз.6).
2. Закрепить тягу (поз.2) через подставку (поз.6) со стойкой (поз.5) при помощи болта М10 (поз.11). Под болт установить шайбу пружинную (поз.15).
3. Закрепить столик (поз.3) на стойке (поз.5) при помощи гаек М6 (поз.10). Под гайки установить шайбы пружинные (поз.14).
4. Вставить тягу (поз.2) в направляющую (поз.1).
5. Закрепить планку (поз.9) на тяге (поз.2) при помощи болта М6 (поз.12). Под болт установить шайбу пружинную (поз.14).
6. Закрепить направляющую (поз.1) на столике (поз.3) при помощи болта М6 (поз.13) и гайки М6 (поз.10). Под гайки установить шайбы пружинные (поз.14).
7. Придать конструкции устойчивость при помощи регулируемых опор (поз.7). Закрепить регулятор (поз.4) в нужном положении на столике (поз.3) рукоятками (поз.4а). Закрепить крючок (поз.8) на планке (поз.9).

Рисунок 1

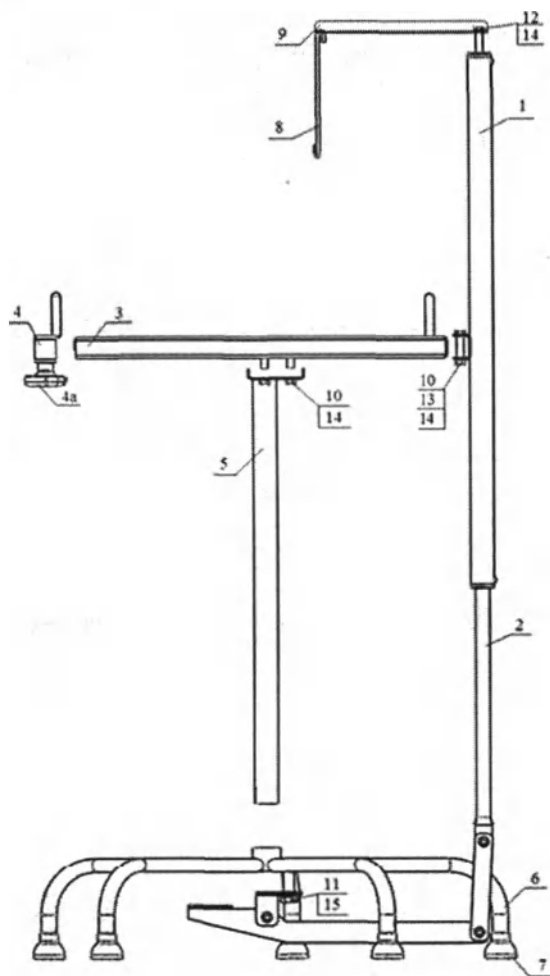

итого прошнуровано,
пронумеровано, верно

6

(шесть)

листов

Директор

И. К. Киреев



ООО «МебельПром»

Российская федерация, 607650, Нижегородская обл., г. Кстово, пл. Ленина,
дом 5а, офис 617, тел. 8(831)4524611, ОГРН 1135250001512, ИНН/КПП
5250058404/525001001 e-mail: Mebelprom.nn@yandex.ru



Инструкция по эксплуатации и сборке (Паспорт)

Набор мебели медицинской для кабинетов и
палат по ТУ 32.50.30-002-25549916-2017

ПОДСТАВКА ДЛЯ ТАЗОВ ТВ-ПДТ

КОПИЯ
ВЕРНА



Нижегородская область, г. Кстово, 2017

С.А. Ковалев
12.12.2017

Инструкция по эксплуатации и сборке (ПАСПОРТ) медицинского изделия
ПОДСТАВКА ДЛЯ ТАЗОВ ТВ-ПДТ производства ООО «МебельПром»

ТУ 32.50.30–002–25549916–2017

РУ _____

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

К сборке и эксплуатации подставки допускаются лица, внимательно изучившие настоящее описание и конструкцию изделия.

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Назначение медицинского изделия - для оснащения медицинских лабораторий, лечебно-профилактических учреждений, а именно: для хранения реактивов, хранения медицинских инструментов, реагентов, для размещения лабораторных приборов и медицинских изделий, размещения пациентов в смотровых и массажных кабинетах, а также для организации работы медицинского персонала и лабораторного применения.

1.2. ПОДСТАВКА ДЛЯ ТАЗОВ ТВ-ПДТ (далее по тексту — подставка) предназначена для использования в качестве держателя для тазов при оснащении рабочего места.

Побочное действие и противопоказания: Не выявлены.

1.3. Подставка изготавливается для эксплуатации при температуре окружающей среды от +10°C до +35°C и относительной влажности 80% при температуре +25°C

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Основные параметры и размеры.

2.2.1. Основные параметры и размеры подставки указаны в таблице 1.

Таблица 1. ТВ-ПДТ

Габаритные размеры (±5 мм)	Значение
Длина, мм	640
Ширина, мм	640
Высота, мм	900
Вес, кг	не более 4

2.2.2. Функциональные размеры указаны в таблице 2.

Таблица 2.

Диаметр основания	640 мм
Высота стойки с регулировкой	900/1250 мм

2.3. Характеристики:

2.3.1 Каркас имеет защитно-декоративное покрытие эпоксидной порошковой краской, нетоксичной, пожаробезопасной, устойчивой к ударам, сколам, средствам дезинфекционной обработки способом протирания.

2.3.2 Покрытие металлических деталей соответствует требованиям IV класса ГОСТ 9.303 и ГОСТ 9.032 по внешнему виду, а по условиям эксплуатации группе УХЛ 4.2 по ГОСТ 9.014.

2.3.3 Поверхность подставки устойчива к дезинфицирующим средствам, разрешенным для дезинфекционной обработки поверхностей в соответствии с действующими НТД на эти средства и ОСТ 42-21-2, МУ 287-113Б утвержденными МЗ РФ 30.12.1998 года.

2.3.6. Средний срок службы подставки до списания не менее 8 лет. За критерий предельного состояния подставки принимается состояние, при котором восстановление работоспособности нецелесообразно по технико-экономическим и функциональным показателям.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1. Комплект подставки подставки соответствует указанному в таблице 3.

Таблица 3.

№	Наименование комплектующего	Количество, шт.	Размеры (±5 мм)
1	Основание	1	25x25
2	Ножка	5	308x20
3	Держатель	1	825x20
4	Тазик	1	
5	Заглушка	5	
6	Болт м10x30	1	
7	Шайба 10	1	
8	Инструкция по эксплуатации и сборке	1	A4

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1 Каркас изделия изготовлен из стального проката, таз изготовлен из нержавеющей стали.

4.2 Сборка подставки осуществляется при помощи стандартных крепежных изделий.

4.3 Подставка состоит из основания, держателя и тазика.

4.4 Держатель представляет собой телескопическую систему в виде двух труб, которая фиксируется с помощью винтового зажима. Это позволяет установить таз на требуемую высоту.

5. ПОДГОТОВКА К СБОРКЕ

5.1. После транспортирования подставки в условиях отрицательных температур, перед распаковкой необходимо выдержать их в нормальных температурных условиях не менее 2 часов.

5.2. Распаковать подставку и проверить целостность покрытия.

5.3. Проверить комплектность.

5.4. Осуществить сборку согласно инструкции.

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

6.1. Подставка не требуют специального технического обслуживания. Рекомендуется периодически (1 раз в 6 месяцев) производить проверку затяжки резьбовых соединений и в случае их ослабления, производить их затяжку.

Производить очистку поверхностей от загрязнений по мере необходимости.

6.2. Подставка, в случае необходимости, дезинфицируют растворами, разрешенными для дезинфекционной обработки поверхностей, согласно «Методическим указаниям по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения» (утв. Минздравом РФ 30.12.1998 N МУ-287-113).

7. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

7.1. Подставка в упаковке предприятия-изготовителя транспортируется крытыми транспортными средствами при температуре от -50°C до +50°C и относительной влажности 100% при температуре +25°C.

7.2. Хранение должно обеспечиваться при тех же условиях в сухих складских помещениях, исключающих воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред.

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

8.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие шкафа требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных в технических условиях и указанных в настоящем паспорте.

8.2. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода шкафа в эксплуатацию, гарантийный срок хранения 6 месяцев.

8.3. В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель безвозмездно ремонтирует или заменяет изделие или его составные части в случае неисправности при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

ПОДСТАВКА ДЛЯ ТАЗОВ ТВ-ПДТ _____

Дата выпуска _____ М. П.

Соответствует ТУ 32.50.30-002-25549916-2017 и признан годным к эксплуатации.

Подпись лиц, ответственных за приемку _____

10. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

на ремонт (замену) в течение гарантийного срока
Изделие _____
наименование и тип изделия


дата выпуска	
номер ТУ	
Приобретено	дата, подпись, штамп торгующей организации

11. УТИЛИЗАЦИЯ

11.1. Для предотвращения загрязнённости окружающей среды все отходы, образующиеся при утилизации изделий и их частей, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией, в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» для отходов класса А.

Инструкция по сборке подставка для тазов ТВ-ПДТ

Рисунок 1

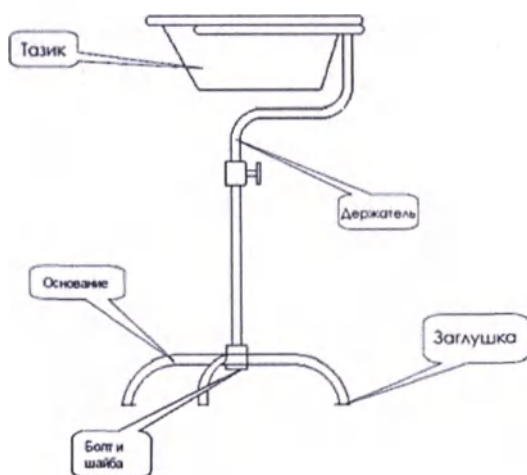

- 1) Перед сборкой должны быть выполнены все работы, указанные в п. 5.1 настоящего паспорта.
- 2) Закрутить ножки в основание.
- 3) Прикрепить держатель к основанию при помощи болта М10х30 и шайбы пружинной 10.
- 4) Установить тазик на держатель.

Итого прошнуровано,
пронумеровано, верно 6

(ШЕСТЬ)

листов

Директор



ООО «МебельПром»

Российская федерация, 607650, Нижегородская обл., г. Кстово, пл. Ленина,
дом 5а, офис 617, тел. 8(831)4524611, ОГРН 1135250001512, ИНН/КПП
5250058404/525001001 e-mail: Mebelprom.nn@yandex.ru



Инструкция по эксплуатации и сборке (Паспорт)

Набор мебели медицинской для кабинетов и
палат по ТУ 32.50.30-002-25549916-2017

СТОЙКА ДЛЯ КАПЕЛЬНИЦЫ ТВ-СДК

КОПИЯ
ВЕРНА



Нижегородская область, г. Кстово, 2017

Комплект С.А.
Г.А.А. 12.12.

**Инструкция по эксплуатации и сборке (ПАСПОРТ) медицинского изделия
СТОЙКА ДЛЯ КАПЕЛЬНИЦЫ ТВ-СДК производства ООО «МебельПром»**

ТУ 32.50.30–002–25549916–2017

РУ _____

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

К сборке и эксплуатации стола допускаются лица, внимательно изучившие настоящее описание и конструкцию изделия.

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Назначение медицинского изделия - для оснащения медицинских лабораторий, лечебно-профилактических учреждений, а именно: для хранения реактивов, хранения медицинских инструментов, реагентов, для размещения лабораторных приборов и медицинских изделий, размещения пациентов в смотровых и массажных кабинетах, а также для организации работы медицинского персонала и лабораторного применения.

1.2 Стойка для капельницы ТВ-СДК (далее по тексту — стойка, стойки) предназначена для оснащения лечебно-профилактических учреждений, а именно: для размещения лабораторных приборов и медицинских изделий, а также для организации работы медицинского персонала.

Побочное действие и противопоказания: не выявлены.

1.3 Стойки изготавливаются для эксплуатации при температуре окружающей среды от +10°C до +35°C и относительной влажности 80% при температуре +25°C.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Основные параметры и размеры.

2.2.1. Основные параметры и размеры стола указаны в таблице 1.

Таблица 1. ТВ-СДК

Габаритные размеры (±5 мм)	Значение
Длина, мм	320
Ширина, мм	320
Высота, мм	1300
Вес, кг	не более 5

2.2.2. Функциональные размеры указаны в таблице 2.

Таблица 2.

Функциональные размеры (±5 мм)	Размеры (±5 мм)
Диаметр основания	320 мм
Высота стойки с регулировкой	1300/2300 мм

2.3. Характеристики:

2.3.1 Стойка штатива имеет защитно-декоративное покрытие эпоксидной порошковой краской по ТУ 2329-002-45318751-2008, нетоксичной пожаробезопасной, устойчивой к ударам, сколам, средствам дезинфекционной обработки способом протирания.

2.3.2 Покрытие металлических деталей соответствует требованиям IV класса ГОСТ 9.303 и ГОСТ

9.032 по внешнему виду, а по условиям эксплуатации группе УХЛ 4.2 по ГОСТ 9.014.

2.3.3 Поверхность штатива устойчива к дезинфицирующим средствам, разрешенным для дезинфекционной обработки поверхностей в соответствии с действующими НТД на эти средства и ОСТ 42-21-2, МУ 287-113Б утвержденными МЗ РФ 30.12.1998 года.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1. Комплект поставки стола соответствует указанному в таблице 3.

Таблица 3.

№	Наименование комплектующего	Количество, шт.	Размеры (±5 мм)
1	Основание	1	320х320
2	Стойка	1	1250х20
3	Держатель	1	
4	Шуруп м10х40	1	
5	Заглушка	5	
8	Инструкция по эксплуатации и сборке	1	A4

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1 Стойка выдерживает нагрузку массой не более 5 кг.

4.2 Стойка имеет постоянную высоту.

4.3 Стойка состоит из:

-основания;

-стойки;

-держателя.

4.4 Основание стойки, заглушки и держатель изготовлены из химически стойкого нетоксичного пластика. В основание штатива устанавливаются пластиковые заглушки.

4.5 Стойка изготовлена из металлической трубы круглого сечения.

5. ПОДГОТОВКА К СБОРКЕ

5.1. После транспортирования стойки в условиях отрицательных температур, перед распаковкой необходимо выдержать его в нормальных температурных условиях не менее 2 часов.

5.2. Распаковать стойку и проверить целостность покрытия.

5.3. Проверить комплектность.

5.4. Осуществить сборку согласно инструкции.

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

6.1. Техническое обслуживание включает в себя периодический осмотр целостности покрытий и проверку надежности резьбовых соединений. В случае ослабления резьбовых соединений необходимо затянуть их ключом.

6.2. Стойка, в случае необходимости, дезинфицируют растворами, разрешенными для дезинфекционной обработки поверхностей, согласно «Методическим указаниям по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения» (утв. Минздравом РФ 30.12.1998 N МУ-287-113).

7. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

7.1. Стол в упаковке транспортируются простыми транспортными средствами при температуре от -50°C до +50°C и относительной влажности 100% при температуре +25°C.

7.2. Хранение должно обеспечиваться при тех же условиях в сухих складских помещениях, исключающих воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред; воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию металла.

7.3. После транспортирования изделия в условиях отрицательных температур, перед распаковкой необходимо выдержать их в нормальных условиях не менее 2 часов.

7.4. Распаковать столик и проверить целостность покрытия и целостность полок (для моделей со стеклянными полками).

7.5. Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки наружных поверхностей (1-3% раствор хлорамина).

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

8.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие стойки требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных в технических условиях и указанных в настоящем паспорте.

8.2. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода стола в эксплуатацию, гарантийный срок хранения 6 месяцев.

8.3. В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель безвозмездно ремонтирует или заменяет изделие или его составные части в случае неисправности при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

СТОЙКА ДЛЯ КАПЕЛЬНИЦЫ ТВ-СДК _____

Дата выпуска _____ М. П.

Соответствует ТУ 32.50.30-002-25549916-2017 и признан годным к эксплуатации.

Подпись лиц, ответственных за приемку _____

10. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Изделие _____

наименование и тип изделия

дата выпуска

номер ТУ

Приобретено

дата, подпись, штамп торгующей организации


11. УТИЛИЗАЦИЯ

11.1. Для предотвращения загрязнённости окружающей среды все отходы, образующиеся при утилизации изделий и их частей, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией, в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» для отходов класса А.

Инструкция по сборке стойка для капельницы ТВ-СДК

- 1) С усилием установить заглушки в отверстия основания.
- 2) Держатель насадить на стойку с усилием, исключая свободный съем его со стойки.
- 3) С помощью шурупа 10x40 соединить стойку с основанием.

Рисунок 1

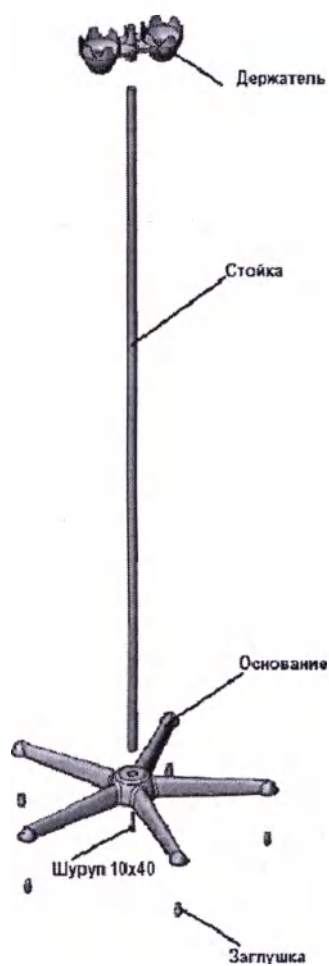

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
6 (ШЕСТЬ) листа(ов)


Комаров Сергей Андреевич Ф.И.О.

 личная подпись



ООО «МебельПром»

Российская федерация, 607650, Нижегородская обл., г. Кстово, пл. Ленина,
дом 5а, офис 617, тел. 8(831)4524611, ОГРН 1135250001512, ИНН/КПП
5250058404/525001001 e-mail: Mebelprom.nn@yandex.ru

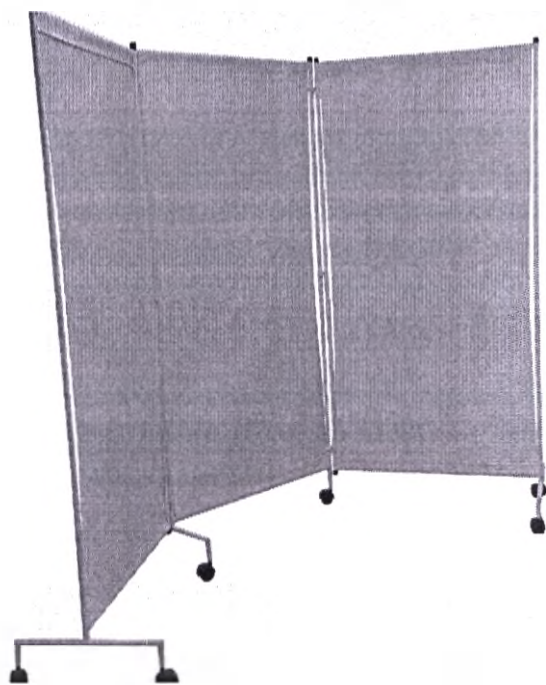

Инструкция по эксплуатации и сборке (Паспорт)

Набор мебели медицинской для кабинетов и
палат по ТУ 32.50.30-002-25549916-2017

ШИРМА ТРЁХСЕКЦИОННАЯ ТВ-ШМ-03

КОПИЯ
ВЕРНА



Нижегородская область, г. Кстово, 2017

Копия верна
М.П. [подпись]

**Инструкция по эксплуатации и сборке (ПАСПОРТ) медицинского изделия
ШИРМА ТРЁХСЕКЦИОННАЯ ТВ-ШМ-03 производства ООО «МебельПром»**

ТУ 32.50.30-002-25549916-2017

РУ _____

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

К сборке и эксплуатации ширмы допускаются лица, внимательно изучившие настоящее описание и конструкцию изделия.

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Назначение медицинского изделия - для оснащения медицинских лабораторий, лечебно-профилактических учреждений, а именно: для хранения реактивов, хранения медицинских инструментов, реагентов, для размещения лабораторных приборов и медицинских изделий, размещения пациентов в смотровых и массажных кабинетах, а также для организации работы медицинского персонала и лабораторного применения.

1.2. Ширма трёхсекционная ТВ-ШМ-03 (далее по тексту — ширма) предназначена для отгораживания пациента, разделения пространства в комнате на удобные отдельные рабочие отсеки для пациентов и рабочие зоны для медицинского персонала в лечебно-профилактических учреждениях.

Побочное действие и противопоказания: Не выявлены.

1.3. Ширма изготавливается для эксплуатации при температуре окружающей среды от +10°C до +35°C и относительной влажности 80% при температуре +25°C.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Основные параметры и размеры.

2.2.1. Основные параметры и размеры ширмы указаны в таблице 1.

Таблица 1. ТВ-ШМ-03

Габаритные размеры (±5 мм)	Значение
Длина, мм	2640
Ширина, мм	15
Высота, мм	1790
Вес, кг	не более 18

2.2.2. Функциональные размеры указаны в таблице 2.

Таблица 2.

Ширма трёхсекционная ТВ-ШМ-03	
Размер	Высота: 1790мм, Ширина: 2640 мм
Размер экрана 1 секции	Высота: 1760 мм, Ширина: 850 мм

2.3. Характеристики:

2.3.1. Усилие, необходимое для перемещения ширмы на колесах не более 10 Н (1 кг).

2.3.2. Каркас ширмы изготовлен из стальных труб круглого сечения.

2.3.3. Покрытие металлических деталей соответствует требованиям IV класса ГОСТ 9.303 и ГОСТ 9.032 по внешнему виду, а по условиям эксплуатации группе УХЛ 4.2 по ГОСТ 9.014.

2.3.4. Экран ширмы изготовлен из пленки ПГВ-040 ГОСТ 9998.

2.3.5. Поверхность ширмы устойчива к дезинфицирующим средствам, разрешенным для дезинфекционной обработки поверхностей в соответствии с действующими НТД на эти средства и ОСТ 42-21-2, МУ 287-113Б утвержденными МЗ РФ 30.12.1998 года.

2.3.6. Средний срок службы ширмы до списания не менее 8 лет. За критерий предельного состояния ширмы принимается состояние, при котором восстановление работоспособности нецелесообразно по технико-экономическим и функциональным показателям.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1. Комплект поставки ширмы соответствует указанному в таблице 3.

Таблица 3.

№	Наименование комплектующего	Количество, шт.	Размеры (±5 мм)
1	Экран	3	1760x850
2	Опорные колеса	4	
3	Опорные колеса	2	
4	Болт	6	6x30
5	Гайка	6	M6
6	Инструкция по эксплуатации и сборке	1	A4

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1. Каркас ширмы изготовлен из стальных труб круглого сечения.

4.2. Ширма собирается путем соединения вертикального каркаса и опорной рамы на колесах.

4.4. В зависимости от модели ширма устанавливается на колеса или полиэтиленовые заглушки.

5. ПОДГОТОВКА К СБОРКЕ

5.1. После транспортирования ширмы в условиях отрицательных температур, перед распаковкой необходимо выдержать его в нормальных температурных условиях не менее 2 часов.

5.2. Распаковать ширму и проверить целостность покрытия.

5.3. Проверить комплектность.

5.4. Осуществить сборку согласно инструкции.

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

6.1. Техническое обслуживание включает в себя периодический осмотр целостности покрытия и крепление каркаса и колес.

6.2. Ширму, в случае необходимости, дезинфицируют растворами, разрешенными для дезинфекционной обработки поверхностей, согласно «Методическим указаниям по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения» (утв. Минздравом РФ 30.12.1998 N МУ-287-113).

7. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

7.1. Ширма в упаковке предприятия-изготовителя транспортируется крытыми транспортными средствами при температуре от -50°C до +50°C и относительной влажности 100% при температуре +25°C.

7.2. Хранение должно обеспечиваться при тех же условиях в сухих складских помещениях, исключающих воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред.

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

8.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие ширмы требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных в технических условиях и указанных в настоящем паспорте.

8.2. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода ширмы в эксплуатацию, гарантийный срок хранения 6 месяцев.

8.3. В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель безвозмездно ремонтирует или заменяет изделие или его составные части в случае неисправности при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Ширма трёхсекционная ТВ-ШМ-03 _____

Дата выпуска _____ М. П.

Соответствует ТУ 32.50.30-002-25549916-2017 и признана годной к эксплуатации.

Подпись лиц, ответственных за приемку _____

10. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

на ремонт (замену) в течение гарантийного срока
Изделие _____
наименование и тип изделия

_____ дата выпуска


_____ номер ТУ

Приобретено _____
дата, подпись, штамп торгующей организации

11. УТИЛИЗАЦИЯ

11.1. Для предотвращения загрязнённости окружающей среды все отходы, образующиеся при утилизации изделий и их частей, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией, в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» для отходов класса А.

Инструкция по сборке ширмы Ширма трёхсекционная ТВ-ШМ-03

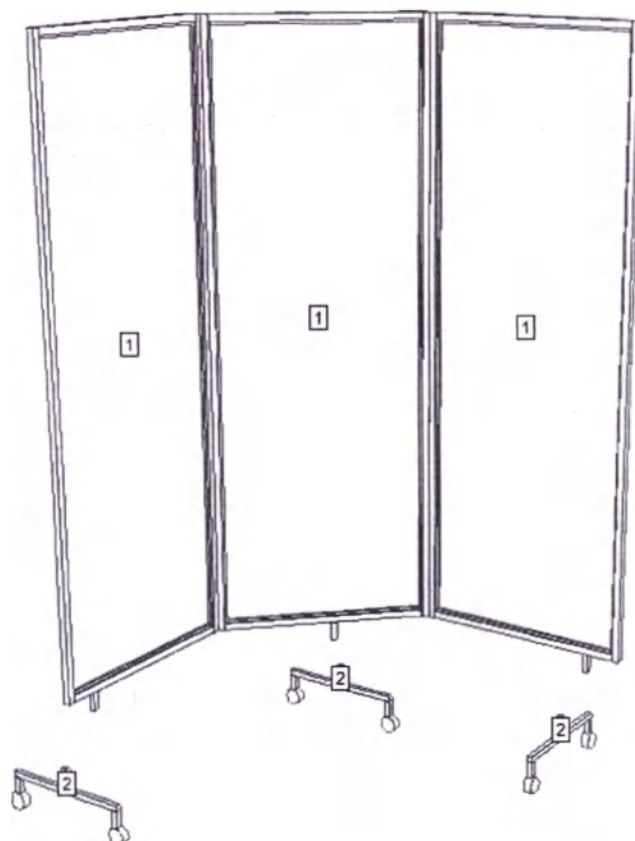

- 1) Экраны № 1 установить на опорные колеса № 2 и закрепить болтами (6х30).
- 2) Соединить секции при помощи соединительных колодок. Вставить заглушки в стойки.

Всего прошито, пронумеровано

и скреплено печатью

5 (печать) листа(ов)

Комаров Сергей Андреевич Ф.И.О.

личная подпись



ООО «МебельПром»

Российская федерация, 607650, Нижегородская обл., г. Кстово, пл. Ленина,
дом 5а, офис 617, тел. 8(831)4524611, ОГРН 1135250001512, ИНН/КПП
5250058404/525001001 e-mail: Mebelprom.nn@yandex.ru



Инструкция по эксплуатации и сборке (Паспорт)

Набор мебели медицинской для кабинетов и
палат по ТУ 32.50.30-002-25549916-2017

ШИРМА ДВУХСЕКЦИОННАЯ ТВ-ШМ-02



Нижегородская область, г. Кстово, 2017

**Инструкция по эксплуатации и сборке (ПАСПОРТ) медицинского изделия
ШИРМА ДВУХСЕКЦИОННАЯ ТВ-ШМ-02 производства ООО «МебельПром»**

ТУ 32.50.30-002-25549916-2017

РУ _____

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

К сборке и эксплуатации ширмы допускаются лица, внимательно изучившие настоящее описание и конструкцию изделия.

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Назначение медицинского изделия - для оснащения медицинских лабораторий, лечебно-профилактических учреждений, а именно: для хранения реактивов, хранения медицинских инструментов, реагентов, для размещения лабораторных приборов и медицинских изделий, размещения пациентов в смотровых и массажных кабинетах, а также для организации работы медицинского персонала и лабораторного применения.

1.2. Ширма двухсекционная ТВ-ШМ-02 (далее по тексту — ширма) предназначена для отгораживания пациента, разделения пространства в комнате на удобные отдельные рабочие отсеки для пациентов и рабочие зоны для медицинского персонала в лечебно-профилактических учреждениях.

Побочное действие и противопоказания: Не выявлены.

1.3. Ширма изготавливается для эксплуатации при температуре окружающей среды от +10°C до +35°C и относительной влажности 80% при температуре +25°C.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Основные параметры и размеры.

2.2.1. Основные параметры и размеры ширмы указаны в таблице 1.

Таблица 1. ТВ-ШМ-02

Габаритные размеры (±5 мм)	Значение
Длина, мм	1760
Ширина, мм	15
Высота, мм	1790
Вес, кг	не более 12

2.2.2. Функциональные размеры указаны в таблице 2.

Таблица 2.

Ширма двухсекционная ТВ-ШМ-02	
Размер	Высота: 1790 мм, Ширина: 1760 мм
Размер экрана 1 секции	Высота: 1760 мм, Ширина: 850 мм

2.3. Характеристики:

2.3.1. Усилие, необходимое для перемещения ширмы на колесах не более 10 Н (1 кг).

2.3.2. Каркас ширмы изготовлен из стальных труб круглого сечения.

2.3.3. Покрытие металлических деталей соответствует требованиям IV класса ГОСТ 9.303 и ГОСТ 9.032 по внешнему виду, а по условиям эксплуатации группе УХЛ 4.2 по ГОСТ 9.014.

2.3.4. Экран ширмы изготовлен из пленки ПГВ-040 ГОСТ 9998.

2.3.5. Поверхность ширмы устойчива к дезинфицирующим средствам, разрешенным для дезинфекционной обработки поверхностей в соответствии с действующими НТД на эти средства и ОСТ 42-21-2, МУ 287-113Б утвержденными МЗ РФ 30.12.1998 года.

2.3.6. Средний срок службы ширмы до списания не менее 8 лет. За критерий предельного состояния ширмы принимается состояние, при котором восстановление работоспособности нецелесообразно по технико-экономическим и функциональным показателям.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1. Комплект поставки ширмы соответствует указанному в таблице 3.

Таблица 3.

№	Наименование комплектующего	Количество, шт.	Размеры (±5 мм)
1	Экран	2	1760x850
2	Опорные колеса	4	
3	Опорные колеса	2	
4	Болт	6	6x30
5	Гайка	6	M6
6	Инструкция по эксплуатации и сборке	1	A4

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1. Каркас ширмы изготовлен из стальных труб круглого сечения.

4.2. Ширма собирается путем соединения вертикального каркаса и опорной рамы на колесах.

4.4. В зависимости от модели ширма устанавливается на колеса или полиэтиленовые заглушки.

5. ПОДГОТОВКА К СБОРКЕ

5.1. После транспортирования ширмы в условиях отрицательных температур, перед распаковкой необходимо выдержать его в нормальных температурных условиях не менее 2 часов.

5.2. Распаковать ширму и проверить целостность покрытия.

5.3. Проверить комплектность.

5.4. Осуществить сборку согласно инструкции.

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

6.1. Техническое обслуживание включает в себя периодический осмотр целостности покрытия и крепление каркаса и колес.

6.2. Ширму, в случае необходимости, дезинфицируют растворами, разрешенными для дезинфекционной обработки поверхностей, согласно «Методическим указаниям по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения» (утв. Минздравом РФ 30.12.1998 N МУ-287-113).

7. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

7.1. Ширма в упаковке предприятия-изготовителя транспортируется крытыми транспортными средствами при температуре от -50°C до +50°C и относительной влажности 100% при температуре +25°C.

7.2. Хранение должно обеспечиваться при тех же условиях в сухих складских помещениях, исключающих воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред.

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

8.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие ширмы требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных в технических условиях и указанных в настоящем паспорте.

8.2. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода ширмы в эксплуатацию, гарантийный срок хранения 6 месяцев.

8.3. В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель безвозмездно ремонтирует или заменяет изделие или его составные части в случае неисправности при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Ширма двухсекционная ТВ-ШМ-02 _____

Дата выпуска _____ М. П.

Соответствует ТУ 32.50.30-002-25549916-2017 и признана годной к эксплуатации.

Подпись лиц, ответственных за приемку _____

10. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Изделие _____
наименование и тип изделия

дата выпуска


номер ТУ

Приобретено _____
дата, подпись, штамп торгующей организации

11. УТИЛИЗАЦИЯ

11.1. Для предотвращения загрязнённости окружающей среды все отходы¹, образующиеся при утилизации изделий и их частей, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией, в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» для отходов класса А.

Инструкция по сборке ширмы Ширма двухсекционная ТВ-ШМ-02

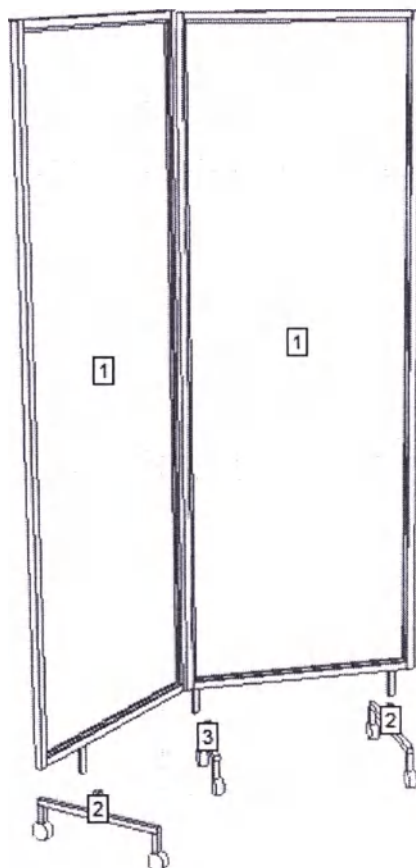


- 1) Экраны № 1 установить на опорные колеса № 2, №3 и закрепить болтами (6х30).
- 2) Соединить секции при помощи соединительных колодок. Вставить заглуши в стойки.

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
5 (пять) листа(ов)
Комаров Сергей Андреевич Ф.И.О.
_____ личная подпись



ООО «МебельПром»

Российская федерация, 607650, Нижегородская обл., г. Кстово, пл. Ленина,
дом 5а, офис 617, тел. 8(831)4524611, ОГРН 1135250001512, ИНН/КПП
5250058404/525001001 e-mail: Mebelprom.nn@yandex.ru

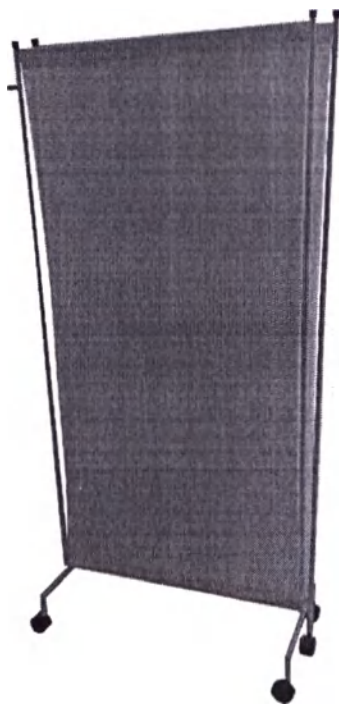

Инструкция по эксплуатации и сборке (Паспорт)

Набор мебели медицинской для кабинетов и
палат по ТУ 32.50.30–002–25549916–2017

ШИРМА ОДНОСЕКЦИОННАЯ ТВ-ШМ-01



Нижегородская область, г. Кстово, 2017

Инструкция по эксплуатации и сборке (ПАСПОРТ) медицинского изделия
ШИРМА ОДНОСЕКЦИОННАЯ ТВ-ШМ-01 производства ООО «МебельПром»

ТУ 32.50.30–002–25549916–2017

РУ _____

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

К сборке и эксплуатации ширмы допускаются лица, внимательно изучившие настоящее описание и конструкцию изделия.

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Назначение медицинского изделия - для оснащения медицинских лабораторий, лечебно-профилактических учреждений, а именно: для хранения реактивов, хранения медицинских инструментов, реагентов, для размещения лабораторных приборов и медицинских изделий, размещения пациентов в смотровых и массажных кабинетах, а также для организации работы медицинского персонала и лабораторного применения.

1.2. Ширма односекционная ТВ-ШМ-01 (далее по тексту — ширма) предназначена для отгораживания пациента, разделения пространства в комнате на удобные отдельные рабочие отсеки для пациентов и рабочие зоны для медицинского персонала в лечебно-профилактических учреждениях.

Побочное действие и противопоказания: Не выявлены.

1.3. Ширма изготавливается для эксплуатации при температуре окружающей среды от +10°C до +35°C и относительной влажности 80% при температуре +25°C.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Основные параметры и размеры.

2.2.1. Основные параметры и размеры ширмы указаны в таблице 1.

Таблица 1. ТВ-ШМ-01

Габаритные размеры (±5 мм)	Значение
Длина, мм	880
Ширина, мм	15
Высота, мм	1790
Вес, кг	не более 6

2.2.2. Функциональные размеры указаны в таблице 2.

Таблица 2.

Ширма односекционная ТВ-ШМ-01	
Размер	Высота: 1790мм Ширина: 880 мм
Размер экрана 1 секции	Высота: 1760 мм Ширина: 850 мм

2.3. Характеристики:

2.3.1. Усилие, необходимое для перемещения ширмы на колесах не более 10 Н (1 кг).

2.3.2. Каркас ширмы изготовлен из стальных труб круглого сечения.

2.3.3. Покрытие металлических деталей соответствует требованиям IV класса ГОСТ 9.303 и ГОСТ 9.032 по внешнему виду, а по условиям эксплуатации группе УХЛ 4.2 по ГОСТ 9.014.

2.3.4. Экран ширмы изготовлен из пленки ПГВ-040 ГОСТ 9998.

2.3.5. Поверхность ширмы устойчива к дезинфицирующим средствам, разрешенным для дезинфекционной обработки поверхностей в соответствии с действующими НТД на эти средства и ОСТ 42-21-2, МУ 287-113Б утвержденными МЗ РФ 30.12.1998 года.

2.3.6. Средний срок службы ширмы до списания не менее 8 лет. За критерий предельного состояния ширмы принимается состояние, при котором восстановление работоспособности нецелесообразно по технико-экономическим и функциональным показателям.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1. Комплект поставки ширмы соответствует указанному в таблице 3.

Таблица 3.

№	Наименование комплектующего	Количество, шт.	Размеры (±5 мм)
1	Экран	2	1700x740
2	Опорные колеса	2	
3	Опорные колеса	1	
4	Болт	6	6x30
5	Гайка	6	M6
6	Инструкция по эксплуатации и сборке	1	A4

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1. Каркас ширмы изготовлен из стальных труб круглого сечения.

4.2. Ширма собирается путем соединения вертикального каркаса и опорной рамы на колесах.

4.4. В зависимости от модели ширма устанавливается на колеса или полиэтиленовые заглушки.

5. ПОДГОТОВКА К СБОРКЕ

5.1. После транспортирования ширмы в условиях отрицательных температур, перед распаковкой необходимо выдержать его в нормальных температурных условиях не менее 2 часов.

5.2. Распаковать ширму и проверить целостность покрытия.

5.3. Проверить комплектность.

5.4. Осуществить сборку согласно инструкции.

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

6.1. Техническое обслуживание включает в себя периодический осмотр целостности покрытия и крепление каркаса и колес.

6.2. Ширму, в случае необходимости, дезинфицируют растворами, разрешенными для дезинфекционной обработки поверхностей, согласно «Методическим указаниям по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения» (утв. Минздравом РФ 30.12.1998 N МУ-287-113).

7. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

7.1. Ширма в упаковке предприятия-изготовителя транспортируется крытыми транспортными средствами при температуре от -50°C до +50°C и относительной влажности 100% при температуре +25°C.

7.2. Хранение должно обеспечиваться при тех же условиях в сухих складских помещениях, исключающих воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред.

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

8.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие ширмы требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных в технических условиях и указанных в настоящем паспорте.

8.2. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода ширмы в эксплуатацию, гарантийный срок хранения 6 месяцев.

8.3. В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель безвозмездно ремонтирует или заменяет изделие или его составные части в случае неисправности при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Ширма односекционная ТВ-ШМ-01 _____

Дата выпуска _____ М. П.

Соответствует ТУ 32.50.30-002-25549916-2017 и признана годной к эксплуатации.

Подпись лиц, ответственных за приемку _____

10. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

на ремонт (замену) в течение гарантийного срока
Изделие _____
наименование и тип изделия


дата выпуска

номер ТУ
Приобретено _____
дата, подпись, штамп торгующей организации

11. УТИЛИЗАЦИЯ

11.1. Для предотвращения загрязнённости окружающей среды все отходы, образующиеся при утилизации изделий и их частей, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией, в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» для отходов класса А.

Инструкция по сборке ширмы Ширма односекционная ТВ-ШМ-01

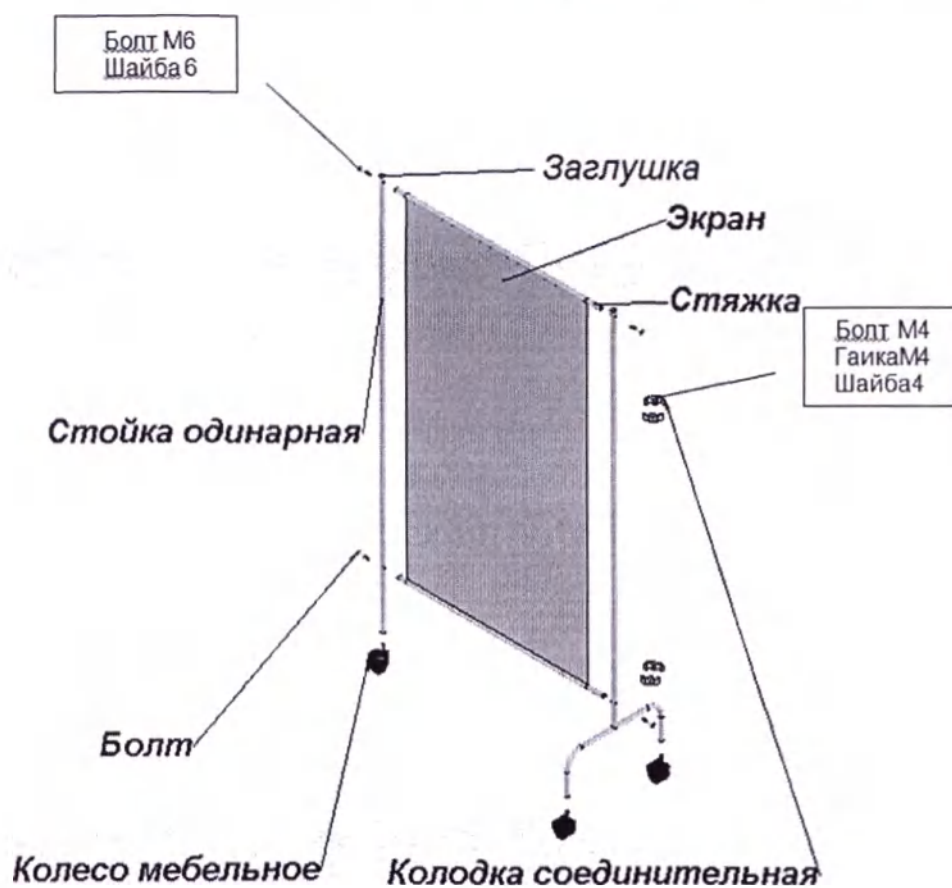

- 1) Продеть стяжки через полотно экрана.
- 2) Прикрепить стяжки экрана к стойкам болтами.
- 3) В зависимости от исполнения прикрепить колеса или вставить заглушки.

Всего прошито, пронумеровано

и скреплено печатью

5 (п. 1 п. 1 п. 1 п. 1 п. 1) листа(ов)

Иванов Сергей Андреевич Ф.И.О.

личная подпись



ООО «МебельПром»

Российская федерация, 607650, Нижегородская обл., г. Кстово, пл. Ленина,
дом 5а, офис 617, тел. 8(831)4524611, ОГРН 1135250001512, ИНН/КПП
5250058404/525001001 e-mail: Mebelprom.nn@yandex.ru



Инструкция по эксплуатации и сборке (Паспорт)

Набор мебели медицинской для кабинетов и
палат по ТУ 32.50.30-002-25549916-2017

СТОЛ АНЕСТЕЗИОЛОГА ТВ-САН-02(н)



Нижегородская область, г. Кстово, 2017

**Инструкция по эксплуатации и сборке (ПАСПОРТ) медицинского изделия
СТОЛ АНЕСТЕЗИОЛОГА ТВ-САН-02(н) производства ООО «МебельПром»**

ТУ 32.50.30–002–25549916–2017

РУ _____

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

К сборке и эксплуатации стола допускаются лица, внимательно изучившие настоящее описание и конструкцию изделия.

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Назначение медицинского изделия - для оснащения медицинских лабораторий, лечебно-профилактических учреждений, а именно: для хранения реактивов, хранения медицинских инструментов, реагентов, для размещения лабораторных приборов и медицинских изделий, размещения пациентов в смотровых и массажных кабинетах, а также для организации работы медицинского персонала и лабораторного применения.

1.2 Стол анестезиолога ТВ-САН-02(н) (далее по тексту – стол, столы) предназначен для оснащения лечебно-профилактических учреждений, а именно: хранения медицинских инструментов, реагентов, для размещения лабораторных приборов и медицинских изделий, а также для организации работы медицинского персонала.

Побочное действие и противопоказания: Не выявлены.

1.3 Столы изготавливаются для эксплуатации при температуре окружающей среды от +10°C до +35°C и относительной влажности 80% при температуре +25°C.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Основные параметры и размеры.

2.2.1. Основные параметры и размеры стола указаны в таблицах 1.

Таблица 1. ТВ-САН-02(н)

Габаритные размеры (±5 мм)	Значение
Длина, мм	600
Ширина, мм	450
Высота, мм	900
Вес, кг	не более 49

2.2.2. Функциональные размеры указаны в таблице 4.

Таблица 4.

Функциональные размеры (±5 мм)	Размеры (±5 мм)
Размеры рабочей плоскости	Длина: 900 мм, Ширина: 560 мм
Расстояние от пола до верхней кромки рабочей плоскости	880 мм
Расстояние от пола до нижней кромки рабочей плоскости	860 мм
Расстояние между боковыми панелями	860 мм
Размер тумбы внутренний	Длина: 410 мм, Глубина: 520 мм, Высота: 760 мм
Размер полки в тумбе	Длина: 408 мм, Глубина: 500 мм
Расстояние между полкой и дном тумбы	370 мм
Расстояние между полкой и крышкой тумбы	370 мм

2.3. Характеристики:

2.3.1 Каркас стола имеет защитно-декоративное покрытие эпоксидной порошковой краской, нетоксичной, пожаробезопасной, устойчивой к ударам, сколам, средствам дезинфекционной обработки способом протирания, прошедшей обработку в термотонеле.

2.3.2 Покрытие металлических деталей соответствует требованиям IV класса ГОСТ 9.303 и ГОСТ 9.032 по внешнему виду, а по условиям эксплуатации группе УХЛ 4.2 по ГОСТ 9.014.

2.3.3 Поверхность стола устойчива к дезинфицирующим средствам, разрешенным для дезинфекционной обработки поверхностей в соответствии с действующими НТД на эти средства и ГОСТ 42-21-2, МУ 287-113Б, утвержденными МЗ РФ 30.12.998 года.

2.3.4 Стол при эксплуатации устойчив к воздействию климатических факторов по ГОСТ 15150 для вида исполнения УХЛ 4.2.

2.3.5 Стол, упакованный в транспортную тару, сохраняет работоспособность после механических воздействий по ГОСТ Р 50444.

2.3.6 Средний срок службы столика до списания не менее 6 лет.

2.3.7 За критерий предельного состояния столиков принимается состояние, при котором восстановление работоспособности нецелесообразно по технико-экономическим и функциональным показателям.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1. Комплект поставки стола соответствует указанному в таблице 5.

Таблица 5.

№	Наименование комплектующего	Количество, шт.	Размеры (±5 мм)
1	Столик	1	600x450x900
2	Колесо	4	
3	Болт м10x25	4	
4	Шайба 10	4	
5	Трубка ручка	1	
6	Кронштейн	2	
7	Винт м5x12	4	
	Шайба 5	4	
8	Инструкция по эксплуатации и сборке	1	A4

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1 Столики изготовлены по единой технологии в виде модульной сборно-разборной конструкции из химстойкой нержавеющей стали толщиной 0,8 мм.

4.2 Дверки и металлические выдвижные ящики открываются и закрываются плавно, без заедания и перекосов.

4.3 Столики при транспортировании и хранении устойчивы к воздействию климатических факторов по ГОСТ 15150 для группы 5 транспортирования и группы 5 хранения.

4.4 Столики представляют собой модульную сборно-разборную конструкцию и в зависимости от модели могут быть с ящиками, без ящиков, с дверцами и нишами.

5. ПОДГОТОВКА К СБОРКЕ

5.1. После транспортирования стола в условиях отрицательных температур, перед распаковкой необходимо выдержать его в нормальных температурных условиях не менее 2 часов.

5.2. Распаковать стол и проверить целостность покрытия.

5.3. Проверить комплектность.

5.4. Осуществить сборку согласно инструкции.

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

6.1. Техническое обслуживание включает в себя периодический осмотр целостности покрытий и проверку надежности резьбовых соединений. В случае ослабления резьбовых соединений необходимо затянуть их ключом.

6.2. Стол, в случае необходимости, дезинфицируют растворами, разрешенными для дезинфекционной обработки поверхностей, согласно «Методическим указаниям по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения» (утв. Минздравом РФ 30.12.1998 N МУ-287-113).

7. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

7.1. Стол в упаковке транспортируются простыми транспортными средствами при температуре от -50°C до +50°C и относительной влажности 100% при температуре +25°C.

7.2. Хранение должно обеспечиваться при тех же условиях в сухих складских помещениях, исключающих воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред; воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию металла.

7.3. После транспортирования изделия в условиях отрицательных температур, перед распаковкой необходимо выдержать их в нормальных условиях не менее 2 часов.

7.4. Распаковать столик и проверить целостность покрытия и целостность полок (для моделей со стеклянными полками).

7.5. При необходимости остатки клея после пленки удалить дезинфицирующим средством Лизоформин 3000. Применять средство только в разбавленном виде! Работать в защитных перчатках.

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

8.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие стола требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных в технических условиях и указанных в настоящем паспорте.

8.2. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода стола в эксплуатацию, гарантийный срок хранения 6 месяцев.

8.3. В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель безвозмездно ремонтирует или заменяет изделие или его составные части в случае неисправности при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

СТОЛ АНЕСТЕЗИОЛОГА _____

Дата выпуска _____ М. П. _____

Соответствует ТУ 32.50.30–002–25549916–2017 и признан годным к эксплуатации.

Подпись лиц, ответственных за приемку _____

10. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Изделие _____
наименование и тип изделия

дата выпуска

номер ТУ

Приобретено _____
дата, подпись, штамп торгующей организации


11. УТИЛИЗАЦИЯ

11.1. Для предотвращения загрязнённости окружающей среды все отходы, образующиеся при утилизации изделий и их частей, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией, в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» для отходов класса А.

Инструкция по сборке стол анестезиолога ТВ-САН-02(н)

- 1) Кронштейны полки прикрутить в соответствующие отверстия винтами M5x12
- 2) Трубку-ручку прикрутить в соответствующие отверстия винтами M5x12
- 3) Колеса прикрепить винтами M10x25 с пружинными шайбами.

Рисунок 1

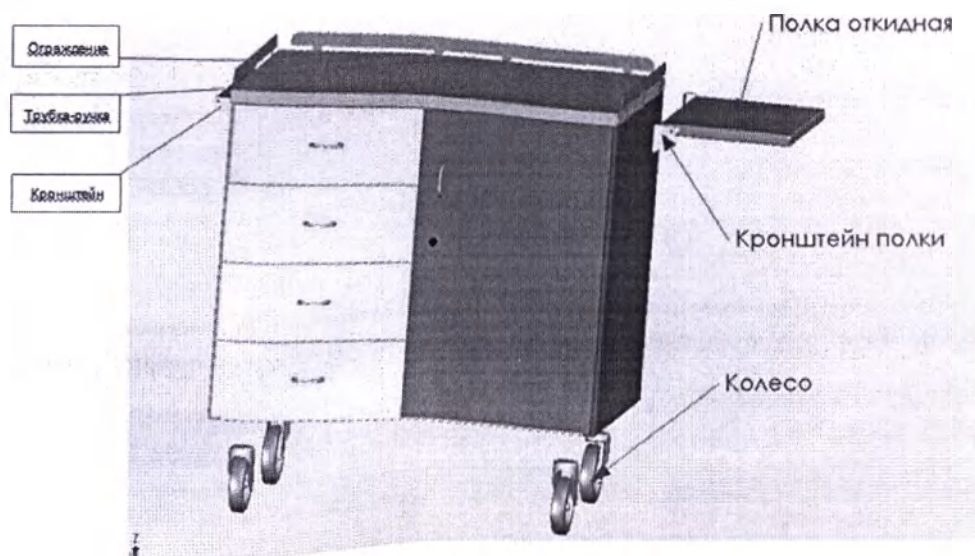

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

6 листа) листа(ов)


Комаров Сергей Андреевич Ф.И.О.

[подпись] личная подпись



ООО «МебельПром»

Российская федерация, 607650, Нижегородская обл., г. Кстово, пл. Ленина,
дом 5а, офис 617, тел. 8(831)4524611, ОГРН 1135250001512, ИНН/КПП
5250058404/525001001 e-mail: Mebelprom.nn@yandex.ru

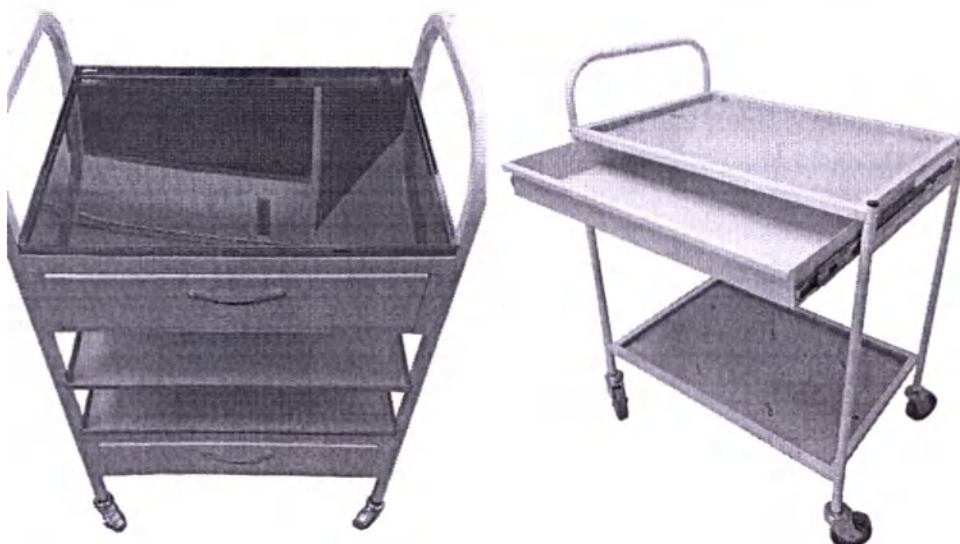

Инструкция по эксплуатации и сборке (Паспорт)

Набор мебели медицинской для кабинетов и
палат по ТУ 32.50.30-002-25549916-2017

СТОЛ МАНИПУЛЯЦИОННЫЙ ТВ-СМН-
01, ТВ-СМН-02

КОПИЯ
ВЕРНА



Нижегородская область, г. Кстово, 2017

Инструкция по эксплуатации и сборке (ПАСПОРТ) медицинского изделия
СТОЛ МАНИПУЛЯЦИОННЫЙ ТВ-СМН-01, ТВ-СМН-02 производства ООО
«МебельПром»

ТУ 32.50.30-002-25549916-2017

РУ _____

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

К сборке и эксплуатации стола допускаются лица, внимательно изучившие настоящее описание и конструкцию изделия.

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Назначение медицинского изделия - для оснащения медицинских лабораторий, лечебно-профилактических учреждений, а именно: для хранения реактивов, хранения медицинских инструментов, реагентов, для размещения лабораторных приборов и медицинских изделий, размещения пациентов в смотровых и массажных кабинетах, а также для организации работы медицинского персонала и лабораторного применения.

1.2 Стол манипуляционный ТВ-СМН-01, ТВ-СМН-02 далее по тексту – стол, столы) предназначен для оснащения лечебно-профилактических учреждений, а именно: хранения медицинских инструментов, реагентов, для размещения лабораторных приборов и медицинских изделий, а также для организации работы медицинского персонала и лабораторного применения.

Побочное действие и противопоказания: Не выявлены.

1.3 Столы изготавливаются для эксплуатации при температуре окружающей среды от +10°C до +35°C и относительной влажности 80% при температуре +25°C.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Основные параметры и размеры.

2.2.1. Основные параметры и размеры стола указаны в таблицах 1-2.

Таблица 1. ТВ-СМН-01

Габаритные размеры (±5 мм)	Значение
Длина, мм	680
Ширина, мм	460
Высота, мм	930
Вес, кг	не более 26

Таблица 2. ТВ-СМН-02

Габаритные размеры (±5 мм)	Значение
Длина, мм	680
Ширина, мм	460
Высота, мм	930
Вес, кг	не более 27

2.2.2. Функциональные размеры указаны в таблице 5.

Таблица 5.

Функциональные размеры (±5 мм)	Размеры (±5 мм)
--------------------------------	-----------------

Размеры рабочей плоскости	Длина: 680 мм, Ширина: 460 мм
Расстояние от пола до верхней кромки рабочей плоскости	930 мм
Расстояние от пола до нижней кромки рабочей плоскости	880 мм
Расстояние между боковыми панелями	640 мм

2.3. Характеристики:

2.3.1 Каркас стола имеет защитно-декоративное покрытие эпоксидной порошковой краской, нетоксичной, пожаробезопасной, устойчивой к ударам, сколам, средствам дезинфекционной обработки способом протирания, прошедшей обработку в термотонеле.

2.3.2 Покрытие металлических деталей соответствует требованиям IV класса ГОСТ 9.303 и ГОСТ 9.032 по внешнему виду, а по условиям эксплуатации группе УХЛ 4.2 по ГОСТ 9.014.

2.3.3 Поверхность стола устойчива к дезинфицирующим средствам, разрешенным для дезинфекционной обработки поверхностей в соответствии с действующими НТД на эти средства и ГОСТ 42-21-2, МУ 287-113Б, утвержденными МЗ РФ 30.12.998 года.

2.3.4 Стол при эксплуатации устойчив к воздействию климатических факторов по ГОСТ 15150 для вида исполнения УХЛ 4.2.

2.3.5 Стол, упакованный в транспортную тару, сохраняет работоспособность после механических воздействий по ГОСТ Р 50444.

2.3.6 Средний срок службы столика до списания не менее 6 лет.

2.3.7 За критерий предельного состояния столиков принимается состояние, при котором восстановление работоспособности нецелесообразно по технико-экономическим и функциональным показателям.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1. Комплект поставки стола соответствует указанному в таблице 6.

Таблица 6.

№	Наименование комплектующего	Количество, шт.	Размеры (±5 мм)
1	Основание	1	
2	Направляющая	1	
3	Стойка	1	
4	Столешница	1	
5	Колесо	4	
6	Шайба	4	
7	Шуруп	8	
8	Инструкция по эксплуатации и сборке	1	A4

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1 Стол состоит из основания, направляющей, стойки, столешницы, колес.

4.2 Каркас изделия изготовлен из стального нержавеющей профиля, столешница из стального нержавеющей листа.

4.3 Направляющая в сборе со стойкой представляют собой телескопическую систему в виде двух труб квадратного сечения, которые фиксируются между собой при помощи рукоятки. Это позволяет установить требуемую высоту.

4.4 Столик установлен на колеса для удобства его передвижения.

4.5 Усилие, необходимое для перемещения стола с номинальной нагрузкой не более 100 Н (10 кг), при этом колеса столика должны быть сориентированы в направлении движения.

5. ПОДГОТОВКА К СБОРКЕ

5.1. После транспортирования стола в условиях отрицательных температур, перед распаковкой необходимо выдержать его в нормальных температурных условиях не менее 2 часов.

5.2. Распаковать стол и проверить целостность покрытия.

5.3. Проверить комплектность.

5.4. Осуществить сборку согласно инструкции.

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

6.1. Техническое обслуживание включает в себя периодический осмотр целостности покрытий и проверку надежности резьбовых соединений. В случае ослабления резьбовых соединений необходимо затянуть их ключом.

6.2. Стол, в случае необходимости, дезинфицируют растворами, разрешенными для дезинфекционной обработки поверхностей, согласно «Методическим указаниям по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения» (утв. Минздравом РФ 30.12.1998 N МУ-287-113).

7. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

7.1. Стол в упаковке транспортируются простыми транспортными средствами при температуре от -50°C до +50°C и относительной влажности 100% при температуре +25°C.

7.2. Хранение должно обеспечиваться при тех же условиях в сухих складских помещениях, исключающих воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред; воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию металла.

7.3. После транспортирования изделия в условиях отрицательных температур, перед распаковкой необходимо выдержать их в нормальных условиях не менее 2 часов.

7.4 Распаковать столик и проверить целостность покрытия и целостность полок (для моделей со стеклянными полками).

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

8.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие стола требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных в технических условиях и указанных в настоящем паспорте.

8.2. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода стола в эксплуатацию, гарантийный срок хранения 6 месяцев.

8.3. В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель безвозмездно ремонтирует или заменяет изделие или его составные части в случае неисправности при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Стол манипуляционный _____

Дата выпуска _____ М. П.

Соответствует ТУ 32.50.30-002-25549916-2017 и признан годным к эксплуатации.

Подпись лиц, ответственных за приемку _____

10. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

на ремонт (замену) в течение гарантийного срока
Изделие _____
наименование и тип изделия

_____ дата выпуска

_____ номер ТУ

Приобретено _____
дата, подпись, штамп торгующей организации

11. УТИЛИЗАЦИЯ

11.1. Для предотвращения загрязнённости окружающей среды все отходы, образующиеся при утилизации изделий и их частей, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией, в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» для отходов класса А.

Инструкция по сборке стол манипуляционный ТВ-СМН-01, ТВ-СМН-02

- 1) Прикрепить направляющую к основанию при помощи винтов М6х45 и гаек М6, зафиксировав их шайбами пружинными 6.
- 2) Прикрутить колеса к основанию при помощи винтов М10х25, зафиксировав их шайбами пружинными 10.
- 3) Прикрепить стойку к столу при помощи винтов М6х35 и гаек М6, зафиксировав их шайбами пружинными 6.
- 4) Вставить стойку в направляющую, зафиксировав их между собой рукояткой.

Рисунок 1



Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

6 (ЦАПМБ) листа(ов)

Комаров Сергей Андреевич Ф.И.О.

[подпись] личная подпись

